

Инструкция по применению

**«Перчатки Pristeen латексные хирургические стерильные опудренные, неопудренные,
размеры 5, 5 ½, 6, 6 ½, 7, 7 ½, 8, 8 ½, 9, 9 ½»
производства «Бета Хэлска Продактс Пвт. Лтд.» Индия.**

Назначение.

«Перчатки Pristeen латексные хирургические стерильные опудренные, неопудренные, размеры 5, 5 ½, 6, 6 ½, 7, 7 ½, 8, 8 ½, 9, 9 ½» одноразового использования предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций.

«Перчатки Pristeen латексные хирургические стерильные опудренные, неопудренные» изготовлены из латекса на основе натурального каучука, качество которого соответствует стандарту ASTM D-3577 BS-EN 455-1,2&3.

Возможно возникновение аллергических реакций на изделие из натурального латекса!

При возникновении аллергических реакций прекратить использование и обратиться к врачу.

Способ применения.

- только для однократного использования.
- стерильно до момента вскрытия или повреждения упаковки.

Внимание:

Перед надеванием перчаток пудра удаляется тщательным протираанием влажной стерильной губкой.

Хранение.

Хранить при комнатной температуре (15 - 25° C), в прохладном, сухом защищенном от света месте.