


Справка об изделии медицинского назначения

ВЕНОСТРИП

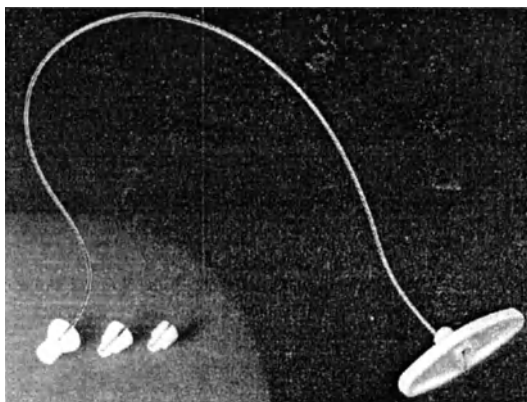

Описание

Венострип – это экстирпатор вен, состоящий из проволочного проводника с пластиковым покрытием, ручки, трех пластиковых накручивающихся колпачков по 9, 12, 15 мм в диаметре и колпачка для закрепления наконечников. Наконечник для экстирпации с острой кромкой, позволяет минимизировать травматичность и приводит к хорошему косметическому результату.

Только для однократного применения.

Показания

- Экстирпация крупных и мелких подкожных вен в следующих случаях:
- Неосложненное первичное варикозное расширение
- Хроническая венозная недостаточность
- Серьезный косметический дефект.

Побочные эффекты

Нет

Способ применения

Пациенту с эпидуральной анестезией или пациенту, находящемуся под наркозом, прощупывают пульсацию бедренной артерии около паховой складки, отступая 2-3 см латеральнее, делают надрез и находят вену. Перевязывают вену и делают надрез на вене ниже уровня перевязки. Пропускают проволочный проводник против хода вены на необходимую длину. С помощью скальпеля делают надрез в дистальной части вены и вытаскивают конец проводника. На конец проводника надевается один из 3-х колпачков (в зависимости от диаметра вены) и фиксируется накручивающимся колпачком. Дистальный конец вены отрезается, затем постепенно тянут за ручку Венострипа таким образом, что удаленная вена остается на проволочном проводнике. Проводят тугое бинтование конечности для избежание кровотечений.

Срок годности

срок годности 5 лет

нельзя использовать после истечения срока, указанного на упаковке

необходимо сразу использовать после открытия упаковки

хранить при температуре $25 \pm 5^{\circ} \text{C}$


Упаковка

Коробки по 10 наборов. Стрипперы можно использовать отдельно.



Инструкция по применению

Venostrip® - набор для экстирпации вен

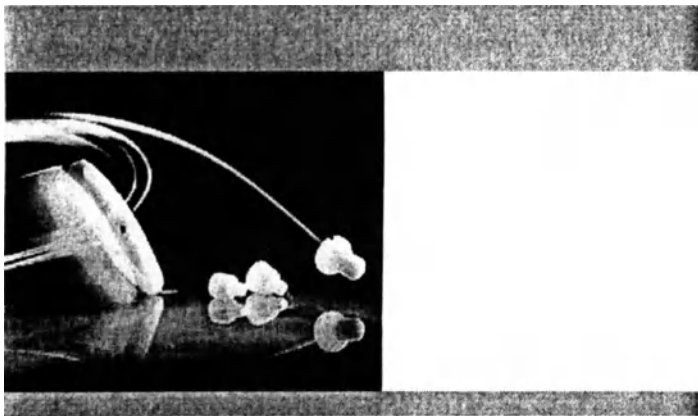

Описание

Venostrip® это экстирпатор вен, состоящий из проволочного проводника с пластиковым покрытием, ручки, трёх пластиковых накручивающихся колпачков по 9, 12 и 15 мм в диаметре и колпачка для закрепления наконечников. Наконечник для экстирпации с острой кромкой, позволяет минимизировать травматичность и приводит к хорошему косметическому результату. Venostrip® - это одноразовый продукт.

Показания

Экстирпация крупных и мелких подкожных вен в следующих случаях:

- Неосложненное первичное варикозное расширение
- Хроническая венозная недостаточность
- Серьезный косметический дефект

Ход операции по удалению большой подкожной вены.

Пациенту с эпидуральной анестезией или находящимся под наркозом, прощупывают пульсацию бедренной артерии около паховой складки, отступая 2-3 см латеральнее, делают надрез и находят вену. Перевязывают вену и делают надрез на вене ниже уровня перевязки. Пропускают проволочный проводник против хода вены на необходимую длину. С помощью скальпеля делают надрез в дистальной части вены и вытаскивают конец проводника. На конец проводника надевается один из 3-х колпачков (в зависимости от диаметра вены) и фиксируется накручивающимся колпачком. Дистальный конец вены отрезается, затем постепенно тянут за ручку Венострипа, таким образом, что удаленная вена остаётся на проволочном проводнике. Проводят тугое бинтование конечности для избежания кровотечений.

Примечание:

Коробки по 10 наборов. Стрипперы можно использовать отдельно

