

Федеральное медико – биологическое агентство России
(ФМБА России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ФГБУ ФБ МСЭ

93 9679

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО руководителя – главного
федерального эксперта
по МСЭ



М.А. Дымочка

ЭКЗОПРОТЕЗ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Памятка по пользованию

ЭПМЖ 00.00 ПП

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Экзопротез молочной железы (далее – экзопротез) предназначен для компенсации послеоперационного дефекта и восстановления симметрии туловища у женщин, перенесших мастэктомию.

1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1.1 Экзопротезы могут быть изготовлены:

- классической, асимметричной формы ЭПМЖ 10 «СИЛУЭТ», ЭПМЖ 10-ОС (с оттеночной сосковой частью) – 10 типоразмеров (с 0 по 9) правого (П) и левого (Л) исполнения, рекомендованные для постоянной носки с наличием дефицита мягких тканей в подмышечной области в позднем послеоперационном периоде для женщин, перенесших радикальное лечение рака молочной железы;

- симметричной формы (удлиненные) ЭПМЖ 14, ПМЖ 14-ОС (с оттеночной сосковой частью) восьми типоразмеров (с 0 по 7);

- двухслойные, классической асимметричной формы ЭПМЖ- А2 -10 типоразмеров (с 0 по 9) правого (П) и левого (Л) исполнения, рекомендованные при постлучевых изменениях послеоперационного поля, локальных аллергических дерматитах, келоидных рубцах.

1.2 Экзопротез входит в состав протеза молочной железы, подбираемого для женщин индивидуально.

2 . НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКЗОПРОТЕЗОМ

2.1 Экзопротез вставляется в подобранный по размеру бюстгальтер со специальным клапаном, либо непосредственно в чашу бюстгальтера, при этом на экзопротез предварительно надевается хлопчатобумажный чехол.

2.2 При пользовании экзопротезом следует избегать:

- сильного сжатия его, ношения в тесном бюстгальтере или другого

ЭПМЖ 00.00 ПП

					ЭПМЖ 00.00 ГП				
Им	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Экзопротез молочной железы	Литера	Лист	Листов	
Разраб.	Крылова			03.2012		A	2	4	
Пров.	Лопатин			03.2012					
					Памятка по пользованию	ФГБУ ФБ МСЭ			
Н.контр.	Игнатенко			03.2012					
INFO@CIRMI.RU									
WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU									

грубого механического воздействия;

- контакта с горячими предметами, действия обогревательных приборов, длительного воздействия солнечных лучей;
- контакта с острыми и колющими предметами;
- воздействия химически активных и ядовитых веществ

3. УХОД ЗА ЭКЗОПРОТЕЗОМ

3.1 Экзопротез следует ежедневно промывать теплым мыльным раствором детского мыла и просушивать полотенцем или салфеткой.

3.2 Допускается купание пользователя с экзопротезом в морской воде и в бассейне с хлорированной водой.

3.3 После плавания в морской или хлорированной воде необходимо экзопротез незамедлительно промыть в теплой воде с детским мылом и просушить полотенцем или салфеткой.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 В комплект поставки экзопротеза входят:

- экзопротез молочной железы – 1 шт.;
- индивидуальный ложемент – 1 шт.;
- коробка для упаковки – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 шт.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации экзопротеза - 12 месяцев со дня выдачи его пользователю.

5.2 Гарантийный срок хранения экзопротеза до ввода в эксплуатацию –четыре месяца.

5.3 В течение указанного гарантийного срока в случае выхода из строя, при условии правильной эксплуатации, предприятие-изготовитель производит замену экзопротеза бесплатно.

№ подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подпись и дата	
В. № подл.	

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводитель- ного докум. и дата	Подп.	Дата
	измене- нных	замене- нных	новых	аннулир- ованных					


INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Дата

Лист

4

Пронумеровано и прошито

4 (четыре) ~~сигла~~

Временно исполняющий
обязанности Руководителя
ФГБУ ФБ МСЭ

М.А. Дымочка

