


Обзор системы

Модуль окраски мазков ADVIA 2120i Автослайдер может быть подключен к гематологическому анализатору ADVIA 2120i и контролируется программным обеспечением анализатора. Автослайдер позволяет автоматически сделать мазок крови и провести его окраску по одной из выбранных методик. Получаемые гематологические препараты готовы для проведения дальнейшей микроскопии.

ВАЖНО

Автослайдер производит забор образца для приготовления мазка только из пробирок находящихся в автосемплере гематологической системы Адвия 2120i.

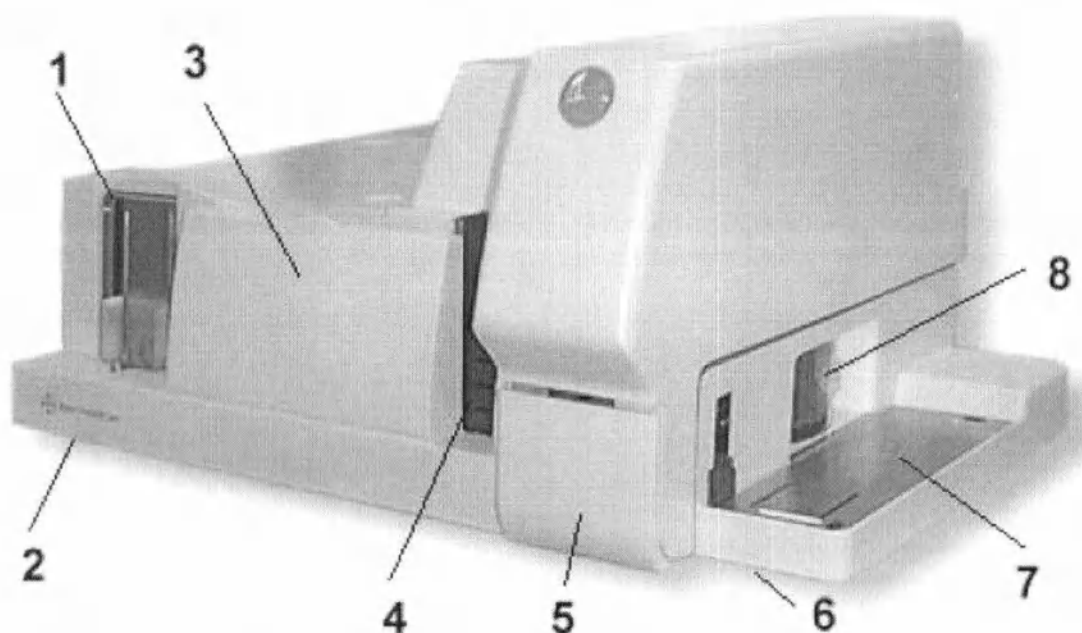

- 1 Отделение для загрузки предметных стекол
- 2 Поддон для разбитых стекол
- 3 Передняя дверца
- 4 Загрузчик штатива
- 5 Дверца для срочного доступа к механизму прибора (???)
- 6 Контейнер для сбора излишков красителей
- 7 Сбор подставок с готовыми стеклами
- 8 Дверца для доступа к блоку реагентов

Отделение для загрузки предметных стекол



Предупреждение

Не пытайтесь полностью освободить отделение для загрузки предметных стёкол! Возможны порезы, если предметные стекла удалены из отделения для загрузки предметных стекол. Избегайте любого контакта с механизмом загрузчика стекол. Крышка загрузки не может быть снята без инструмента. Не выключайте сенсоры.

Поддон для разбитых стекол