

Макет этикеток на медицинское изделие

НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ
ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
«Интифика ***SARS-CoV-2***, серии: E005, E006»
производства ООО «Компания Алкор Био»

Форма исполнения 1

стр. 2,3

Форма исполнения 2

стр. 4,5,6

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Внешняя этикетка



Форма 1

Кат № кат. № 470-01



LOT E005



2022-04-29



Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

LOT E005



2020-10-29

REF 470-01



2022-04-29

IVD



Σ 100



ТУ 21.20.23-563-98539446-2020


РУ № _____

ФОРМА 1

Состав набора:

- | | |
|--|-------|
| 1. ПЦР-смесь-SC2 | 1 пр. |
| 2. Ферменты (Taq+RT) | 1 пр. |
| 3. ПКО-положительный контрольный образец | 1 пр. |
| 4. Вода без нуклеаз | 1 пр. |
| 5. Инструкция | 1 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |
| 7. Вкладыш | 1 шт. |

Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

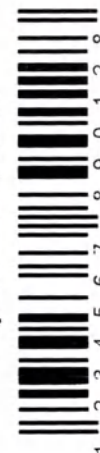

F1



LOT E005



2022-04-29



Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

LOT E005



2020-10-29

REF 470-01



2022-04-29

IVD



Σ 100



ТУ 21.20.23-563-98539446-2020

РУ № _____

ФОРМА 1


Состав набора:

- | | |
|--|---------|
| 1. ПЦР-смесь-SC2 | 100 пр. |
| 2. Ферменты (Taq+RT) | 1 пр. |
| 3. ПКО-положительный контрольный образец | 1 пр. |
| 4. Вода без нуклеаз | 1 пр. |
| 5. Инструкция | 1 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |
| 7. Вкладыш | 1 шт. |

Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006



F1

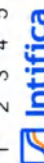

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006



Внутренние этикетки



Форма 1

Кат № кат. № 470-01

на флакон:

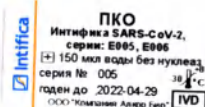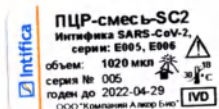

или на пакет

*с индивидуальными
пробирками:*

на пакет:



ПЦР-смесь-SC2
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

100 пробирок по 10 мкл
серия № 005
годен до 2022-04-29
хранить при -30...-18 °C
готов к использованию



ООО "Компания Алкор Био"





ПКО
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

|+| 150 мкл воды без нуклеаз
серия № 005
годен до 2022-04-29



ООО "Компания Алкор Био"

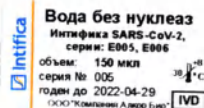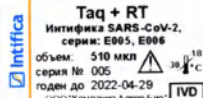

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Внешняя этикетка



Форма 2
Кат № 470-02



LOT E005



2022-04-29



-30...+18 °C

Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

LOT E005



2020-10-29

REF 470-02



2022-04-29

IVD



Σ 100



ТУ 21.20.23-563-98539446-2020

РУ № _____

ФОРМА 2

В состав набора также входит Комплект реагентов для
выделения РНК (упакован отдельно)

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|---|-------|
| 1. ПЦР-смесь-SC2 | 1 пр. |
| 2. Ферменты (Taq+RT) | 1 пр. |
| 3. ПКО-положительный
контрольный образец | 1 пр. |
| 4. Вода без нуклеаз | 1 пр. |
| 5. Инструкция | 1 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |
| 7. Вкладыш | 1 шт. |

Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8



LOT E005



2022-04-29



+2...+25 °C

Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

LOT E005



2020-10-29

REF 470-02



2022-04-29

IVD



Σ 100



В состав набора также входит Комплект реагентов для ОТ-ПЦР (упакован отдельно)
Инструкция, Паспорт и Вкладыш к набору находятся в упаковке Комплекта для ОТ-ПЦР


ФОРМА 2

Комплект реагентов для
выделения РНК

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|---|-------|
| 1. Лизирующий буфер | 1 фл. |
| 2. Осадитель НК | 1 фл. |
| 3. Раствор для отмывки | 2 фл. |
| 4. Буфер для растворения НК | 1 фл. |
| 5. ОКО - отрицательный
контрольный образец | 1 пр. |

Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

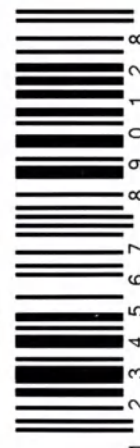

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

F1



Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Внешняя этикетка



Форма 2
Кат № 470-02



LOT E005



2022-04-29



Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

LOT E005



2020-10-29

REF 470-02



2022-04-29

IVD



Σ 100



TU 21.20.23-563-98539446-2020
PU № _____

ФОРМА 2

В состав набора также входит Комплект реагентов
для выделения РНК (упакован отдельно)

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|---|---------|
| 1. ПЦР-смесь-SC2 | 100 пр. |
| 2. Ферменты (Taq+RT) | 1 пр. |
| 3. ПКО-положительный
контрольный образец | 1 пр. |
| 4. Вода без нуклеаз | 1 пр. |
| 5. Инструкция | 1 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |
| 7. Вкладыш | 1 шт. |

Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8



F1



PU № _____

TU 21.20.23-563-98539446-2020

LOT E005



2022-04-29



Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

LOT E005



2020-10-29

REF 470-02



2022-04-29

IVD



Σ 100



В состав набора также входит Комплект реагентов для ОТ-ПЦР (упакован отдельно)
Инструкция, Паспорт и Вкладыш к набору находятся в упаковке Комплекта для ОТ-ПЦР


ФОРМА 2

Комплект реагентов для
выделения РНК

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|---|-------|
| 1. Лизирующий буфер | 1 фл. |
| 2. Осадитель НК | 1 фл. |
| 3. Раствор для отмывки | 2 фл. |
| 4. Буфер для растворения НК | 1 фл. |
| 5. ОКО - отрицательный
контрольный образец | 1 пр. |

Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

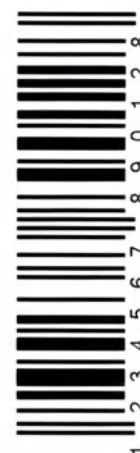

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

F1



Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Внутренние этикетки

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Форма 2

Кат № 470-02

Комплекс реактивов для ОТ-ПЦР:

Intifica
Вода без нуклеаз
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
объем: 150 мкл
серия № 005
годен до 2022-04-29
+25 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
Taq + RT
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
объем: 510 мкл
серия № 005
годен до 2022-04-29
+25 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
ПЦР-смесь-SC2
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
объем: 1020 мкл
серия № 005
годен до 2022-04-29
+25 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

*или на пакет
с индивидуальными
пробирками:*

Intifica
ПЦР-смесь-SC2
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
100 пробирок по 10 мкл
серия № 005
годен до 2022-04-29
хранить при -30...-18 °C
готов к использованию
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

Комплекс реактивов для выявления РНК:

Intifica
Лизирующий буфер
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
объем: 30 мл
серия № 005
годен до 2022-04-29
готов к использованию
+2 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
Осадитель НК
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
объем: 40 мл
серия № 005
годен до 2022-04-29
готов к использованию
+25 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
Раствор для отмывки
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
объем: 50 мл
серия № 005
годен до 2022-04-29
готов к использованию
+25 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
Раствор для отмывки
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
объем: 50 мл
серия № 005
годен до 2022-04-29
готов к использованию
+25 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
Буфер для растворения НК
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
объем: 10 мл
серия № 005
годен до 2022-04-29
готов к использованию
+25 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

на флакон:

Intifica
ПКО
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
+150 мкл воды без нуклеаз
серия № 005
годен до 2022-04-29
+25 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

на пакет:

Intifica
ПКО
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006
+150 мкл воды без нуклеаз
серия № 005
годен до 2022-04-29
-30 °C
IVD
ООО "Компания Алкор Био"

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 6 (лист) лист 28

Генеральный директор
ООО «Компания Аикор Био» Д.П. Полинцев



Фотографические изображения медицинского изделия

НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ
ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
«Интифика ***SARS-CoV-2***, серии: E005, E006»
производства ООО «Компания Алкор Био»

Форма исполнения 1

стр. 2,3

Форма исполнения 2

стр. 4,5,6,7,8

Часть упаковки с указанием производителя
и адреса производства

стр. 9

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ в виде
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ В
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
«Инטיפика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

Инטיפика SARS-CoV-2, серия: E005, E006
Инטיפика SARS-CoV-2, серия: E005, E006

Инטיפика SARS-CoV-2, серии: E005, E006



Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Инטיפика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

LOT E005 2020-11-11
475-01 2022-05-11
ТУ 21.20.23-563-985.94-05-2020
РФ №

ФОРМА 1

Состав набора:

1. ПЦР-смесь SC2 1 гр
2. Ферменты (Taq+RT) 1 гр
3. ПКО-положительный контрольный образец 1 гр
4. Вода без ионов 1 гр
5. Инструкции 1 шт
6. Паспорт 1 шт
7. Бюксы 1 шт

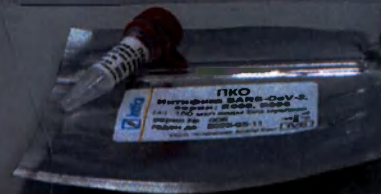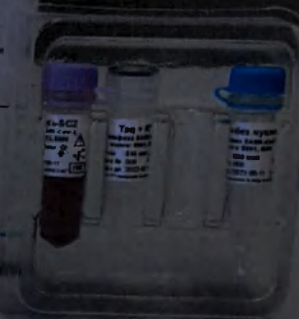

ООО «Компания Алтис Вест»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., дом 40, лит. А
Телефон/факс: (813) 477-47-79
В К Л А Д № 0054
Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени
«Инטיפика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

Серия E005		Серия E006	
№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование
1	ПЦР-смесь SC2	1	ПЦР-смесь SC2
2	Ферменты (Taq+RT)	2	Ферменты (Taq+RT)
3	ПКО-положительный контрольный образец	3	ПКО-положительный контрольный образец
4	Вода без ионов	4	Вода без ионов
5	Инструкции	5	Инструкции
6	Паспорт	6	Паспорт
7	Бюксы	7	Бюксы


ООО «Компания Алтис Вест»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., дом 40, лит. А
Телефон/факс: (813) 477-47-79
В К Л А Д № 0054

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени
«Инטיפика SARS-CoV-2, серии: E005, E006»

Кит № 475-01
Серия E005
Формат № 1
Комплектация 5000 шт

Наименование контрольного образца	Положительный результат		
	CFR	CT	ΔRn
Положительный образец для SARS-CoV-2 (серия E005)	35	35	35
Положительный образец для SARS-CoV-2 (серия E006)	35	35	35
Положительный образец для SARS-CoV-2 (серия E007)	35	35	35
Положительный образец для SARS-CoV-2 (серия E008)	35	35	35
Положительный образец SARS-CoV-2 (серия E009)	35	35	35
Положительный образец SARS-CoV-2 (серия E010)	35	35	35
Положительный образец SARS-CoV-2 (серия E011)	35	35	35



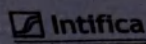

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТИТРА
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСК КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ОТ-ПЕР С ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ В
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
«Дистрибутор SARS-CoV-2, серия: E005, E006»

Микрофлора ЭАЭС-Сей-2, регион ЭАЭС, 2000	Фигура 1	сер. № 479-01
Микрофлора ЭАЭС-Сей-2, регион ЭАЭС	Фигура 2	сер. № 479-01

Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени

LOD	0000		2030-11-11	ФОРМА 1
				Состав набора:
RED	479-01		2030-06-11	1 ПП-сигнал-SC2 100 шт
RED				2 Форматы (Таб+RT) 1 шт
RED				3 ПКО-плакаты (с контрастными обложками) 1 шт
RED				4 Бюкс для учителя 1 шт
RED				5 Копирование 1 шт
RED				6 Печатки 1 шт
RED				7 Карандаш 1 шт

Ты 21.03.23-563-08030446-2020

Р/В 28

ПКО
ИНТИФИКАЦИЯ SARS-CoV-2,
серии: E006, E008
(+) 150 мкл воды без нуклеинок
серия № 006
годен до 2022-05-11
(С) "Микродиагностика" ООО

пцр-смесь-SC2
идентификатор SARS-CoV-2
серии: E005, E006
100 проб

ООО «Компания Альянс Банк»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., дом 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-47-79
ПАСПОРТ № 8804

Набор реагентов для выполнения РНК-анализов на СМА-Суп-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени
в количестве, достаточном для 1000 тестов

[illegible]

ООО «Компания Альянс»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., дом 40, лит А
Телефон/факс: (812) 671-87-79
В К Л А Д Ы 111 № 1906

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
Модельная SARS-CoV-2 смесь: V105, V106.

Кат. № 470-01	Фигуры 1	
Список № 1004	Вспарыватель № 1	Вспарыватель 1000 м

Наименование исследуемого параметра	Полученные значения		
	СФУМ	ДТ № 1 карты мелк	ВГ Q1000
Перегруппированные для Cu/Zn (класс ВЗС)	31	33	33
Перегруппированные для Cu/Zn (класс ВЗС)	31	33	33
Перегруппированные для Cu/Zn (класс Су)	35	35	35
Перегруппированные для Cu/Zn (класс F-PAB)	31	30	30
Перегруппированные Cu/ZnF1 (класс ВЗС)	40	40	40
Перегруппированные Cu/ZnF8 (класс ВЗС)	40	40	40
Перегруппированные Cu/Zn (класс Су)	40	40	40

ОТК. — Общественный М. 1.

Intifica

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИЛИ
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Набор реагентов SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

Набор реагентов SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

**Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006**

Набор реагентов для выделения РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в реальном времени

ФОРМА 2

Состав комплекта реагентов:
1. ПЦР-смесь, 40 шт.
2. Флуоресцентный (Tag-RT)
3. ПЦР-ингибиторный
контрольный образец,
4. Вода Дист. чистая,
5. Буферный,
6. Пакетик,
7. Вспомогательный

**Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006**

Набор реагентов для выделения РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в реальном времени

ФОРМА 2

Состав комплекта реагентов:
1. Лизирующий буфер,
2. Осадитель НК,
3. Раствор для этикиции,
4. Буфер для восстановления НК,
5. ОД - отрицательный,
контрольный образец

Осадитель НК
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

Лизирующий буфер
Интифика SARS-CoV-2,
серии: E005, E006

ООО «Вектор» Адрес: Санкт-Петербург, Звонковский пр., дом 40, лит. А
Телефон: (813) 671-87-76
В М.Л.А. 2.04.05 по 0.000

Набор реагентов для выделения РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в реальном времени

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Кат. № 07000
Срок до 0.000

Формат: 2

Наименование	Единица измерения	Количество
ПЦР-смесь	шт.	40
Флуоресцентный (Tag-RT)	шт.	1
ПЦР-ингибиторный контрольный образец	шт.	1
Вода Дист. чистая	л	1
Буферный	л	1
Пакетик	шт.	1
Вспомогательный	шт.	1

ООО «Вектор» Адрес: Санкт-Петербург, Звонковский пр., дом 40, лит. А
Телефон: (813) 671-87-76
В М.Л.А. 2.04.05 по 0.000

Набор реагентов для выделения РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в реальном времени

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Кат. № 07000
Срок до 0.000

Формат: 2

Наименование	Единица измерения	Количество
Лизирующий буфер	шт.	1
Осадитель НК	шт.	1
Раствор для этикиции	шт.	1
Буфер для восстановления НК	шт.	1
ОД - отрицательный, контрольный образец	шт.	1




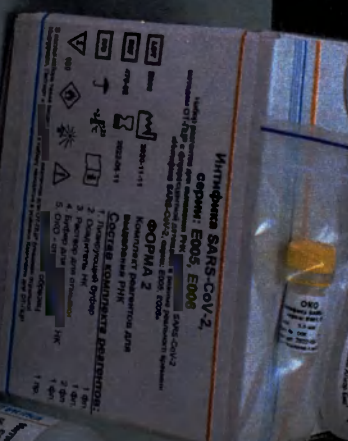


Table 1: Results of the diagnostic test.

№ п/п	№ пробы	Результат	Комментарий
1	1	Положительный	
2	2	Положительный	
3	3	Положительный	
4	4	Положительный	
5	5	Положительный	
6	6	Положительный	
7	7	Положительный	
8	8	Положительный	
9	9	Положительный	
10	10	Положительный	

Table 2: Results of the diagnostic test.

№ п/п	№ пробы	Результат	Комментарий
1	1	Положительный	
2	2	Положительный	
3	3	Положительный	
4	4	Положительный	
5	5	Положительный	
6	6	Положительный	
7	7	Положительный	
8	8	Положительный	
9	9	Положительный	
10	10	Положительный	

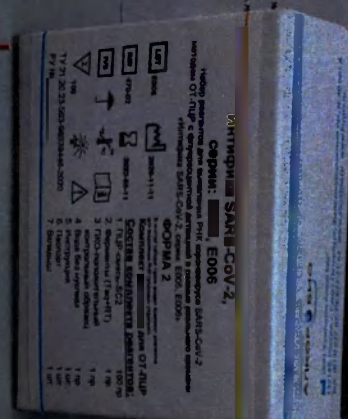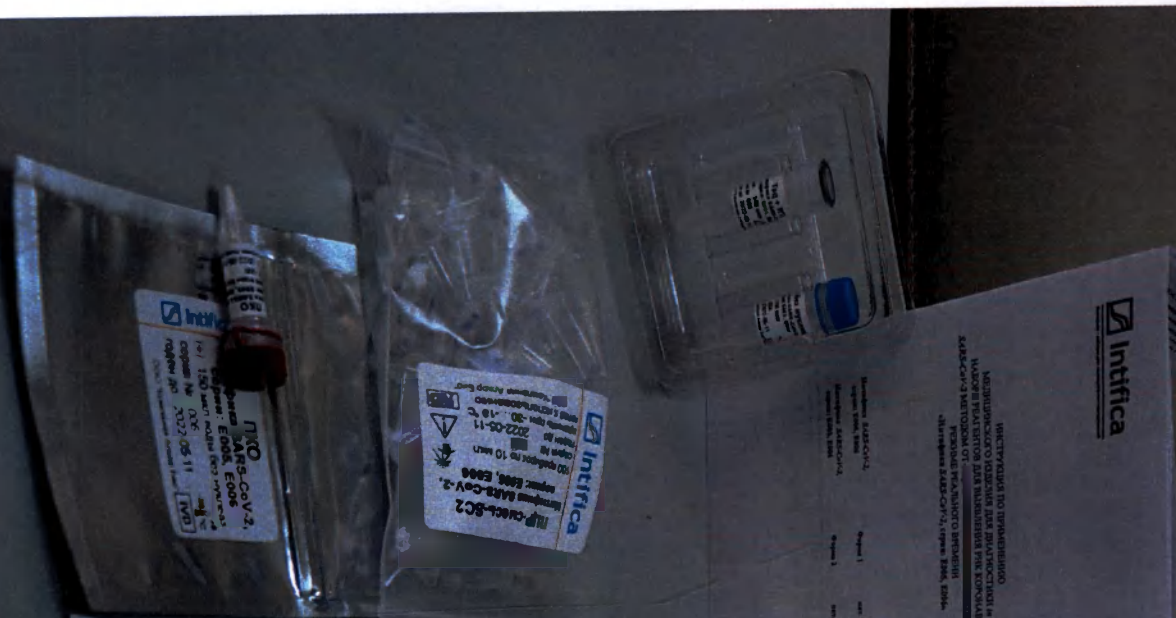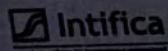

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ПОДЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЕГО
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ В
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
«Интефика SARS-CoV-2, серия: E005, E006»

Интефика SARS-CoV-2,
серия: E005, E006

Формы 1

кат. № 470-61

Интефика SARS-CoV-2,
серия: E005, E006

Формы 2

кат. № 470-62

Интефика SARS-CoV-2, серия: E005, E006

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Интефика SARS-CoV-2, серия: E005, E006»

LOT E005

2020-11-11

REF 470-62

2022-06-11

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ФОРМА 2

В наборе реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Интефика SARS-CoV-2, серия: E005, E006»

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР

Состав комплекта реагентов:

1. ПЦР-смесь-SC2 1 гр.

2. Ферменты (Taq+RT) 1 гр.

3. ПКО-позитивный 1 гр.

4. ПКО-негативный 1 гр.

5. Вода без нуклеотидов 1 л.

6. Инструкция 1 шт.

7. Паспорт 1 шт.

8. Вкладыш 1 шт.

9. Вкладыш 1 шт.

10. Вкладыш 1 шт.

11. Вкладыш 1 шт.

12. Вкладыш 1 шт.

13. Вкладыш 1 шт.

14. Вкладыш 1 шт.

15. Вкладыш 1 шт.

16. Вкладыш 1 шт.

17. Вкладыш 1 шт.

18. Вкладыш 1 шт.

19. Вкладыш 1 шт.

20. Вкладыш 1 шт.

21. Вкладыш 1 шт.

22. Вкладыш 1 шт.

23. Вкладыш 1 шт.

24. Вкладыш 1 шт.

25. Вкладыш 1 шт.

26. Вкладыш 1 шт.

27. Вкладыш 1 шт.

28. Вкладыш 1 шт.

29. Вкладыш 1 шт.

30. Вкладыш 1 шт.

31. Вкладыш 1 шт.

32. Вкладыш 1 шт.

33. Вкладыш 1 шт.

34. Вкладыш 1 шт.

35. Вкладыш 1 шт.

36. Вкладыш 1 шт.

37. Вкладыш 1 шт.

38. Вкладыш 1 шт.

39. Вкладыш 1 шт.

40. Вкладыш 1 шт.

41. Вкладыш 1 шт.

42. Вкладыш 1 шт.

43. Вкладыш 1 шт.

44. Вкладыш 1 шт.

45. Вкладыш 1 шт.

46. Вкладыш 1 шт.

47. Вкладыш 1 шт.

48. Вкладыш 1 шт.

49. Вкладыш 1 шт.

50. Вкладыш 1 шт.

51. Вкладыш 1 шт.

52. Вкладыш 1 шт.

53. Вкладыш 1 шт.

54. Вкладыш 1 шт.

55. Вкладыш 1 шт.

56. Вкладыш 1 шт.

57. Вкладыш 1 шт.

58. Вкладыш 1 шт.

59. Вкладыш 1 шт.

60. Вкладыш 1 шт.

61. Вкладыш 1 шт.

62. Вкладыш 1 шт.

63. Вкладыш 1 шт.

64. Вкладыш 1 шт.

65. Вкладыш 1 шт.

66. Вкладыш 1 шт.

67. Вкладыш 1 шт.

68. Вкладыш 1 шт.

69. Вкладыш 1 шт.

70. Вкладыш 1 шт.

71. Вкладыш 1 шт.

72. Вкладыш 1 шт.

73. Вкладыш 1 шт.

74. Вкладыш 1 шт.

75. Вкладыш 1 шт.

76. Вкладыш 1 шт.

77. Вкладыш 1 шт.

78. Вкладыш 1 шт.

79. Вкладыш 1 шт.

80. Вкладыш 1 шт.

81. Вкладыш 1 шт.

82. Вкладыш 1 шт.

83. Вкладыш 1 шт.

84. Вкладыш 1 шт.

85. Вкладыш 1 шт.

86. Вкладыш 1 шт.

87. Вкладыш 1 шт.

88. Вкладыш 1 шт.

89. Вкладыш 1 шт.

90. Вкладыш 1 шт.

91. Вкладыш 1 шт.

92. Вкладыш 1 шт.

93. Вкладыш 1 шт.

94. Вкладыш 1 шт.

95. Вкладыш 1 шт.

96. Вкладыш 1 шт.

97. Вкладыш 1 шт.

98. Вкладыш 1 шт.

99. Вкладыш 1 шт.

100. Вкладыш 1 шт.

101. Вкладыш 1 шт.

102. Вкладыш 1 шт.

103. Вкладыш 1 шт.

104. Вкладыш 1 шт.

105. Вкладыш 1 шт.

106. Вкладыш 1 шт.

107. Вкладыш 1 шт.

108. Вкладыш 1 шт.

109. Вкладыш 1 шт.

110. Вкладыш 1 шт.

111. Вкладыш 1 шт.

112. Вкладыш 1 шт.

113. Вкладыш 1 шт.

114. Вкладыш 1 шт.

115. Вкладыш 1 шт.

116. Вкладыш 1 шт.

117. Вкладыш 1 шт.

118. Вкладыш 1 шт.

119. Вкладыш 1 шт.

120. Вкладыш 1 шт.

121. Вкладыш 1 шт.

122. Вкладыш 1 шт.

123. Вкладыш 1 шт.

124. Вкладыш 1 шт.

125. Вкладыш 1 шт.

126. Вкладыш 1 шт.

127. Вкладыш 1 шт.

128. Вкладыш 1 шт.

129. Вкладыш 1 шт.

130. Вкладыш 1 шт.

131. Вкладыш 1 шт.

132. Вкладыш 1 шт.

133. Вкладыш 1 шт.

134. Вкладыш 1 шт.

135. Вкладыш 1 шт.

136. Вкладыш 1 шт.

137. Вкладыш 1 шт.

138. Вкладыш 1 шт.

139. Вкладыш 1 шт.

140. Вкладыш 1 шт.

141. Вкладыш 1 шт.

142. Вкладыш 1 шт.

143. Вкладыш 1 шт.

144. Вкладыш 1 шт.

145. Вкладыш 1 шт.

146. Вкладыш 1 шт.

147. Вкладыш 1 шт.

148. Вкладыш 1 шт.

149. Вкладыш 1 шт.

150. Вкладыш 1 шт.

151. Вкладыш 1 шт.

152. Вкладыш 1 шт.

153. Вкладыш 1 шт.

154. Вкладыш 1 шт.

155. Вкладыш 1 шт.

156. Вкладыш 1 шт.

157. Вкладыш 1 шт.

158. Вкладыш 1 шт.

159. Вкладыш 1 шт.

160. Вкладыш 1 шт.

161. Вкладыш 1 шт.

162. Вкладыш 1 шт.

163. Вкладыш 1 шт.

164. Вкладыш 1 шт.

165. Вкладыш 1 шт.

166. Вкладыш 1 шт.

167. Вкладыш 1 шт.

168. Вкладыш 1 шт.

169. Вкладыш 1 шт.

170. Вкладыш 1 шт.

171. Вкладыш 1 шт.

172. Вкладыш 1 шт.

173. Вкладыш 1 шт.

174. Вкладыш 1 шт.

175. Вкладыш 1 шт.

176. Вкладыш 1 шт.

177. Вкладыш 1 шт.

178. Вкладыш 1 шт.

179. Вкладыш 1 шт.

180. Вкладыш 1 шт.

181. Вкладыш 1 шт.

182. Вкладыш 1 шт.

183. Вкладыш 1 шт.

184. Вкладыш 1 шт.

185. Вкладыш 1 шт.

186. Вкладыш 1 шт.

187. Вкладыш 1 шт.

188. Вкладыш 1 шт.

189. Вкладыш 1 шт.

190. Вкладыш 1 шт.

191. Вкладыш 1 шт.

192. Вкладыш 1 шт.

193. Вкладыш 1 шт.

194. Вкладыш 1 шт.

195. Вкладыш 1 шт.

196. Вкладыш 1 шт.

197. Вкладыш 1 шт.

198. Вкладыш 1 шт.

199. Вкладыш 1 шт.

200. Вкладыш 1 шт.

201. Вкладыш 1 шт.

202. Вкладыш 1 шт.

203. Вкладыш 1 шт.

204. Вкладыш 1 шт.

205. Вкладыш 1 шт.

206. Вкладыш 1 шт.

207. Вкладыш 1 шт.

208. Вкладыш 1 шт.

209. Вкладыш 1 шт.

210. Вкладыш 1 шт.

211. Вкладыш 1 шт.

212. Вкладыш 1 шт.

213. Вкладыш 1 шт.

214. Вкладыш 1 шт.

215. Вкладыш 1 шт.

216. Вкладыш 1 шт.

217. Вкладыш 1 шт.

218. Вкладыш 1 шт.

219. Вкладыш 1 шт.

220. Вкладыш 1 шт.

221. Вкладыш 1 шт.

222. Вкладыш 1 шт.

223. Вкладыш 1 шт.

224. Вкладыш 1 шт.

225. Вкладыш 1 шт.

226. Вкладыш 1 шт.

227. Вкладыш 1 шт.

228. Вкладыш 1 шт.

229. Вкладыш 1 шт.

230. Вкладыш 1 шт.

231. Вкладыш 1 шт.

232. Вкладыш 1 шт.

233. Вкладыш 1 шт.

234. Вкладыш 1 шт.

235. Вкладыш 1 шт.

236. Вкладыш 1 шт.

237. В




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ в виде
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ в
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
«Интифика SARS-CoV-2, серия: E005, E006»

Набор реагентов SARS-CoV-2, серия: E005, E006 Форма 1 Кат. № 470-01
Набор реагентов SARS-CoV-2, серия: E005, E006 Форма 2 Кат. № 470-02

Интифика SARS-CoV-2, серии: E005, E006

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«Интифика SARS-CoV-2, серия: E005, E006»

LOT: 0001 2020-11-11

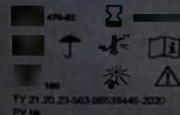

ТУ 21.20.23-563-98535440-2020
РУ №

ФОРМА 2

В комплект входят: 1. ПЦР-смесь SC2 100 пр.
2. Пробы (Таргет) 1 пр.
3. ПЦР-положительный контрольный образец 1 пр.
4. Вода без ионов 1 пр.
5. Инструкция 1 шт.
6. Паспорт 1 шт.
7. Ветеринар 1 шт.



Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в режиме реального времени «Интифика SARS-CoV-2, серия: E005, E006» Форма 2

Кат. № 470-02
Серия № E006





№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	ПЦР-смесь SC2	100 пр.	1
2	Пробы (Таргет)	1 пр.	1
3	ПЦР-положительный контрольный образец	1 пр.	1
4	Вода без ионов	1 пр.	1
5	Инструкция	1 шт.	1
6	Паспорт	1 шт.	1
7	Ветеринар	1 шт.	1




Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика SARS-CoV-2, серия: E005, E006» Форма 2

Кат. № 470-02
Серия № E006

Наименование контролируемого параметра	Полученные значения		
	СРМ	КС М/пробы	КС КРИО
Полученные значения для СРМ (серия E005)	35	35	35
Полученные значения для СРМ (серия E006)	35	35	35
Полученные значения для СРМ (серия E005)	35	35	35
Полученные значения для СРМ (серия E006)	35	35	35
Полученные значения для СРМ (серия E005)	35	35	35
Полученные значения для СРМ (серия E006)	35	35	35
Полученные значения для СРМ (серия E005)	35	35	35
Полученные значения для СРМ (серия E006)	35	35	35

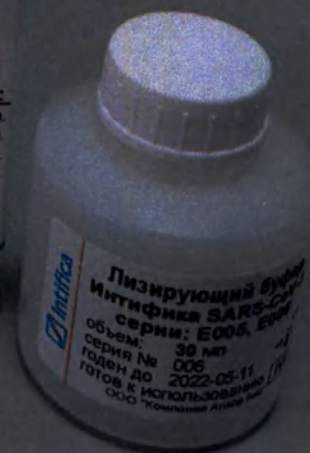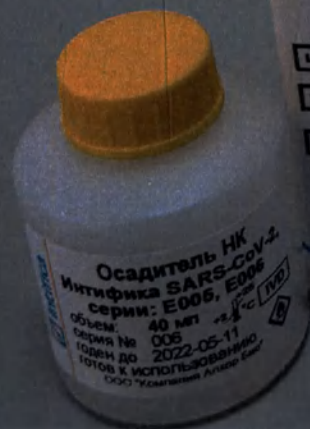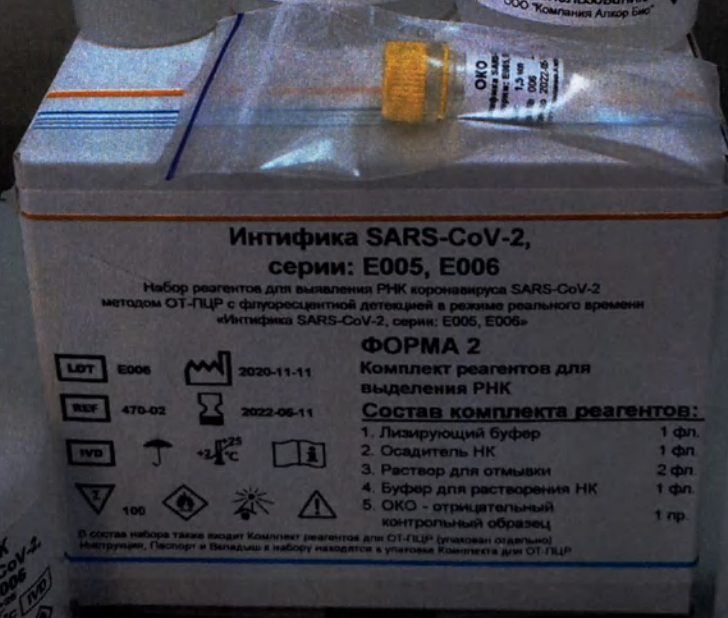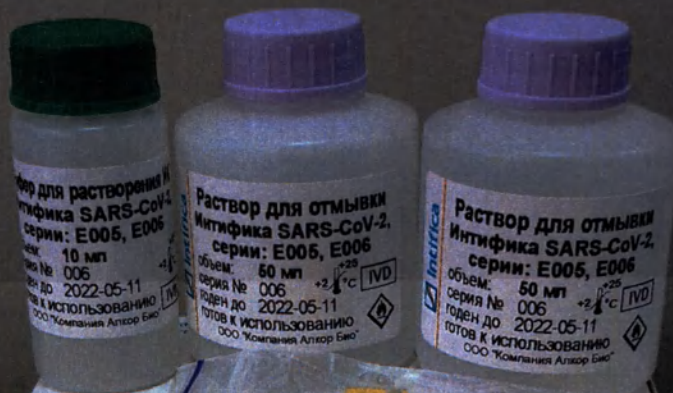

ООО "Компания Алкор Био"
192148, Россия, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д.40 А
(812) 677-87-79, 677-21-65; info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

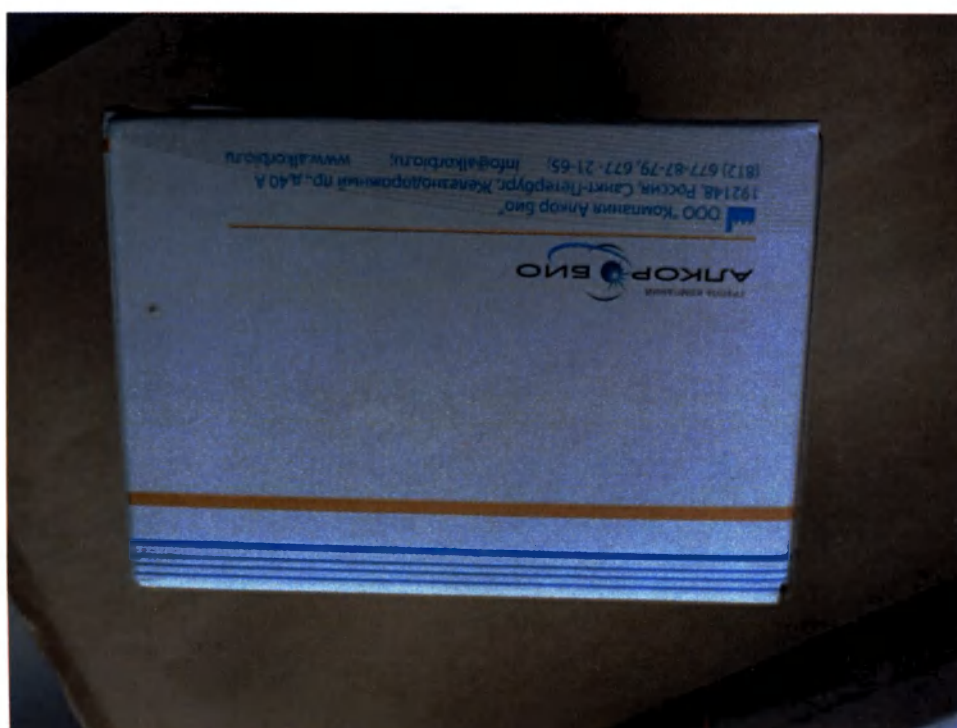

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (листы) лист 08

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
_____ Д.Г. Полынцев

