

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Средства для ухода за мягкими контактными линзами High Fresh+ с гиалуронатом натрия

(для всех типов мягких контактных линз)

Назначение

Средство для ухода за мягкими контактными линзами представляет собой раствор для хранения, дезинфекции, ополаскивания, увлажнения, ежедневной очистки мягких контактных линз.

Бонус БИОСОВМЕСТИМОСТИ связан с наличием в составе полимера с выраженными вискокоэластичными свойствами. Это еще более улучшает

Смазывание и биопереносимость линз после надевания, уменьшает время Адаптации, обеспечивает увлажнение во время дневного ношения. В итоге – длительный комфорт. Удаляет протеины.

Химический состав: Полигексаметиленбигуанид 0.0001%, динатрия эдетат 0.1%, Натрия гиалуронат 0,01%, наполнители и дистиллированная вода до 100%.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

1) Метод 5-7 минутной очистки

Смочить линзу раствором. Потереть пальцами руки обе поверхности в течение 10-15 секунд. Ополоснуть раствором. Поместить в контейнер, наполненный раствором, закрыть и оставить не менее чем на 5-7- минут.

Перед надеванием, ополоснуть линзу раствором.

2) Метод без трения в пальцах.

Поместить линзы в контейнер, заполненный раствором, и оставить на 2-3 часа или на ночь. Перед надеванием ополоснуть раствором.

