

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Средства увлажняющего офтальмологического

HIGH FRESH+REWETTING DROPS

Для всех типов контактных линз

Комфорт и восстановление: восстанавливает увлажненность, смачиваемость и переносимость

СТЕРИЛЬНО А - Производятся в антисептической форме

Назначение: Предназначен для смазки и увлажнения как мягких контактных линз, так и проницаемых для газов жестких линз.

Состав: Химический состав: Полигексаметиленбигуанид 0.0001%, динатрия эдетат 0.1%, Натрия гиалуронат 0,01%, наполнители и дистиллированная вода до 100%.

Руководство по применению

- тщательно вымойте руки;
 - извлеките из соответствующего контейнера линзу, которая уже продезинфицирована раствором
 - капните 2-3 капли средства на линзу, перед тем как вставить ее в глаз;
 - вставьте линзу;
- линза будет смазываться от 1-2 капель и после того, как она вставлена в глаз

СВОЙСТВА: Средство увлажняющее офтальмологическое HIGH FRESH+REWETTING DROPS

- Уникальный раствор, обладает сильным дезинфицирующим, консервирующим, увлажняющим и очищающим действием.
- НОВИНКА!** На основе гиалуроната натрия. Этот полимер, обладающий отличными вязкоэластичными свойствами, улучшает смачиваемость и биотолерантность линз благодаря способности удерживать влагу. Средство увлажняющее офтальмологическое HIGH FRESH+REWETTING DROPS смачивает линзы как сразу после применения, так и при ношении в течение

всего дня, обеспечивая продолжительный комфорт, снижая возможности появления раздражений.

рН и осмотическая концентрация раствора таковы, что обеспечивают биотолерантность органических тканей и жидкостей глаза.
Производятся в антисептической форме: СТЕРИЛЬНО А

ПОКАЗАНИЯ: Показано для хранения, дезинфекции, ополаскивания и увлажнения, промывки и удаления в течение ежедневной носки белково-слизистых отложений всех типов мягких контактных линз.

;
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: достоверно установленных противопоказаний не отмечено, если только речь не идет об аллергии или специфической чувствительности к некоторым компонентам раствора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

открыв средство увлажняющее офтальмологическое HIGH FRESH+REWETTING DROPS, его нужно использовать в течение трех месяцев; возможно появившийся осадок следует удалять.

Не пользуйтесь раствором, если печать нарушена, ибо в этом случае стерильность не гарантируется.

Чтобы избежать заражения, никогда не помещайте пипетку на какие-либо поверхности¹.

Прототип – Средство увлажняющее офтальмологическое High Fresh+REWETTING DROPS РУ ФСН№2006/2257 от 27 декабря 2006 года



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на
2 (Двух) листах
Белякова Г.И.

