

АО «КРОНТ-М»

141402 Россия, г.Химки, Московская обл., ул.Спартакoвская, д.9, пом.1
Тел/факс. (495) 500-48-84 (многоканальный)
E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт стола пеленального СП-01-«КРОНТ»
зав. № _____

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Штамп предприятия _____
подпись, штамп ОТК

Владелец и его адрес _____
название организации (полностью)
индекс, город, область/район, улица, дом, строение, телефон

Характер неисправности _____
заполняется лицом, ответственным за техническое обслуживание

Контактное лицо, ответственное за техническое обслуживание:

ФИО, телефон, e-mail

Дата возникновения неисправности _____

Подпись _____

Выполнена работа по устранению неисправностей: _____

дата

подпись

Штамп предприятия

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРОНТ-М»**

**СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ
СП-01-«КРОНТ»**

ПАСПОРТ

КРПФ.942819.0800 ПС

ред.01.21



г. Химки
Московская область

Прошнуровано и скреплено
печатью _____ листов

Борис

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» (далее по тексту «стол») предназначен для гигиенического обслуживания и проведения медицинских манипуляций (регистрационное удостоверение №ФСР 2007/00115 от _____ г.). Применяется для оснащения детских больничных, амбулаторно-поликлинических, социальных учреждений и учреждений охраны материнства и детства.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Каркас стола выполнен из облегченных металлических труб круглого сечения Ø22 мм, покрытых порошковой химически стойкой краской.
- 2.2. Столешница, нижняя полка и ящики выполнены из полимерных материалов: полипропилена и полистирола.
- 2.3. Стол оборудован 4 поворотными колесными опорами Ø50+75 мм с резиновым ободом и тормозом.
- 2.4. Усилие перемещения не более - 150 Н.
- 2.5. Габаритные размеры стола -(885x780x910)±40мм.
- 2.6. Масса не более 17,0 кг.
- 2.7. Размеры рабочей поверхности столешницы - (720x680x100)±20мм.
- 2.8. Рабочие размеры нижней полки - (770±20 x400±20x10±4) мм.
- 2.9. Расстояние между столешницей и нижней полкой 400± 40 мм.
- 2.10. Внутренние размеры ящика (375x275x100) ± 20мм.
- 2.11. Допустимая нагрузка не более, кг: на стол 30;
на столешницу 20;
на нижнюю полку 10.



Рис. 1

2.12. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфекции способом протирания в соответствии с МУ 287-113, действующими методическими документами по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ для дезинфекции поверхностей.

2.13. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4.2. по ГОСТ 15150.

2.14. Срок службы не менее 5 лет.

2.15 Маркировочные символы:

2.15.1 Маркировка стола:

Маркировочная табличка	Описание
	Маркировочная табличка: - товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование изделия; - обозначение технических условий; - номер регистрационного удостоверения; - год выпуска; - заводской номер; - страна происхождения.

2.15.2 На внешней стороне упаковки нанесены манипуляционные знаки

					
«Хрупкое. Осторожно»	«Верх»	«Беречь от влаги»	«Крюками не брать»	«Пределы температуры»	«Предел по количеству ярусов в штабеле»

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стол пеленальный поставляется в разобранном виде (по заказу может поставляться в собранном)

Таблица 1

№	Наименование	Кол-во	Маркир. №
1	Столешница	1	-
2	Нижняя полка	1	-
3	Ящик	2	-
4	Стойка передняя с колесными опорами	1	001
5	Стойка задняя с колесными опорами	1	002
6	Стяжка передняя	2	101
7	Стяжка боковая верхняя	2	102
8	Стяжка боковая нижняя	2	117
9	Опора нижней полки	1	301
10	Комплект крепежный №1	1	-
11	Комплект крепежный №2	1	-
12	Комплект крепежный №3	1	-
13	Маркировочная табличка	1	-
14	Паспорт	1	-
15	Схема сборки	1	-
16	Упаковочный лист	1	-

4. СБОРКА СТОЛА ПЕЛЕНАЛЬНОГО

- Провести распаковку транспортировочной тары.
- Освободить составляющие части стола от упаковки.

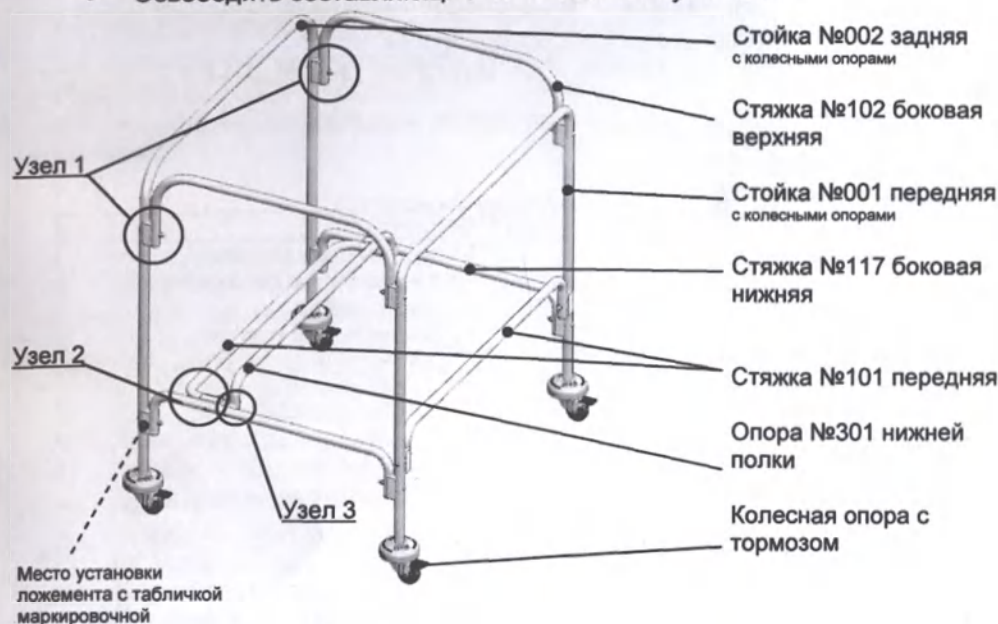


Рис.2 Каркас стола пеленального

Рекомендуемая последовательность сборки

Для сборки каркаса стола необходим ключ гаечный, с открытым или кольцевым зевом 10 мм и отвертка слесарно-монтажная для винтов с крестообразным шлицем (не входят в комплект поставки). Номера комплектов крепежных соответствуют номерам сборочных узлов (таблица 2).

1. На один из ложементов из комплекта крепежного №1 наклеить маркировочную табличку (название изделия, зав.№, год выпуска), предварительно сняв защитный слой с клеящейся поверхности. Место установки ложементов с табличкой указано на рис.2.
2. На стойку переднюю №001 установить стяжку переднюю №101 - **Узел 1**.
3. Стойку переднюю №001 и стойку заднюю №002 соединить между собой двумя стяжками боковыми верхними №102 и двумя стяжками боковыми нижними №117 - **Узел 1**.
4. На стяжки боковые нижние №117 установить стяжку переднюю №101 - **Узел 2** и опору нижней полки №301 - **Узел 3**.
5. Небольшим нажатием установить столешницу и нижнюю полку до полного соприкосновения с каркасом.
6. Установить ящики в направляющие, расположенные на нижней полке.
7. Перед применением стола необходимо все детали, изготовленные из полимерных материалов, вымыть водно-мыльным раствором, ополоснуть водой и высушить.

Таблица 2

Узел 1 	Крепежные элементы из комплекта 1: Ложемент – 10 шт. Болт М6х55 – 10 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт. Шайба Ø6 – 10 шт.
Узел 2 	Крепежные элементы из комплекта 2: Ложемент – 2 шт. Болт М6х55 – 2 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт. Шайба Ø6 – 2 шт.
Узел 3 	Крепежные элементы из комплекта 3: Втулка – 2 шт. Болт М6х60 – 2 шт. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт. Шайба Ø6 – 2 шт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-012-11769436-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Подпись _____

Штамп предприятия

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Утилизация стола и его составных частей после истечения срока службы должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым коммунальным отходам).

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Стол в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при следующих условиях:

- Температура окружающей среды $-50^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$;
- Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$. При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной.
- Число рядов столов на стеллаже не должно превышать: 10

7.2. Стол должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой.

Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание стола пеленального производить без специального инструмента. Не реже 1 раза в месяц проверять затяжку всех крепежных элементов, при необходимости подтянуть.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола пеленального СП-01-«КРОНТ» требованиям ТУ 9452-012-11769436-2002.

9.2. Гарантийный срок – 2 года со дня изготовления изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года.

9.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Срок устранения неисправности не более 30 дней после получения изготовителем.

Внимание! Предприятие-изготовитель оплачивает услуги транспортной компании по доставке и отправке оборудования при гарантийном ремонте от терминала в городе потребителя до терминала в городе Москва и обратно.

Для ускорения процесса доставки предпочтительно пользоваться услугами транспортной компании Деловые линии.

ВНИМАНИЕ: Грузополучатель АО «КРОНТ-М», ИНН5047004056, телефон 8(985)861-30-56

9.4. При отправке стола на гарантийный ремонт необходимо заполнить гарантийный талон.

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.5. Адрес предприятия-изготовителя: АО «КРОНТ-М»

141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1.
Тел: 8(495) 500-48-84 (многоканальный).

E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com.

Сервисный центр: телефон 8(985)861-30-56, E-mail: service@kront.com

 **ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8(495) 500-48-84**

Внимание! В послегарантийный период предприятие-изготовитель осуществляет на договорной основе ремонт стола пеленального СП-01-«КРОНТ».