



Наименование составных частей

1) световая индикация

Всего 8 световых индикаторов, их коды 1, 2, 3, ..., 8 справа - налево, их индикация Во всех моделях такова.

PO: выключатель электропитания (зеленая лампочка)

PR: неисправность электропитания (красная лампочка)

HP: высокое давление (красный индикатор)

LP: низкое давление (желтая лампа)

H.T: Перегрев (красная лампочка)

H.O2: Содержание кислорода $\geq 85\%$, (зеленая лампочка)

M.O2: содержание кислорода от 85% до 72% (желтая лампа)

L.O2: Содержание кислорода $< 72\%$, (красный индикатор)

2) Выключатель электропитания

3) Кислородный ротаметр

Расположение поплавка ротаметра показывает величину выходного потока кислорода (л / мин.).

4) ручка регулятора кислородного ротаметра

Другое название ручки кислородного ротаметра – клапан контроля потока. Он регулирует и контролирует выход потока кислорода.

Не проворачивайте ручку с усилием, чтобы не повредить клапан. Поверните ее против часовой стрелки для включения, по часовой стрелке чтобы выключить.

5) Выход распылителя (опция) Дренажный выход

При повышенной влажности, используйте дренажный выход для осушки

Порядок работы

1. Разъедините увлажнитель вращением в направлении по часовой стрелке. Налейте необходимое количество дистиллированной или холодной кипяченой воды (уровень между верхней и нижней отметкой), а затем плотно завинтите бутылку.



2. Подключите электропитание, шнур питания подключите к розетке концентратора кислорода и к розетке электропитания. Включите выключатель электропитания.



3. Отрегулируйте выход кислорода в соответствии с потребностью, выставив на градуированной части расходомера рекомендованный поток кислорода (по часовой стрелке – открыто, против часовой стрелке – закрыто, корректные показания расхода считываются по верхней части поплавка, при использовании концентраторов с одним выходом: А) Jay-3A регулируется до 3L/min, В) Jay-5A – до 5L/min, С) Jay-8A – до 8L/min, D) Jay-10A – до 10L/min, для двойного выхода: Jay - 3A – до 2-3L/min, В) Jay-5A - до 3-5L/min, С) Jay-8A – до 4-8L/min, D) Jay-10A – до 5-10L/min).



4. Подключить входной конец кислородной трубки к выходу увлажнителя, затем уложить кислородные трубки за ушами пациента, установить носовые патрубки в ноздри пациента. Наилучшее время процедуры с целью профилактики составляет 40 – 50 мин. При медицинском использовании время процедуры должно быть установлено по рекомендациям врача.

