


ЗАО «Приборы и Оборудование для Научных Исследований»

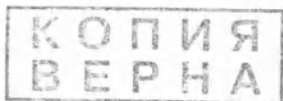

**ШИРМА
РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ
ШРБ1-«ПОНИ»**

**ПАСПОРТ
ТУКЕ 305123.005 ПС**

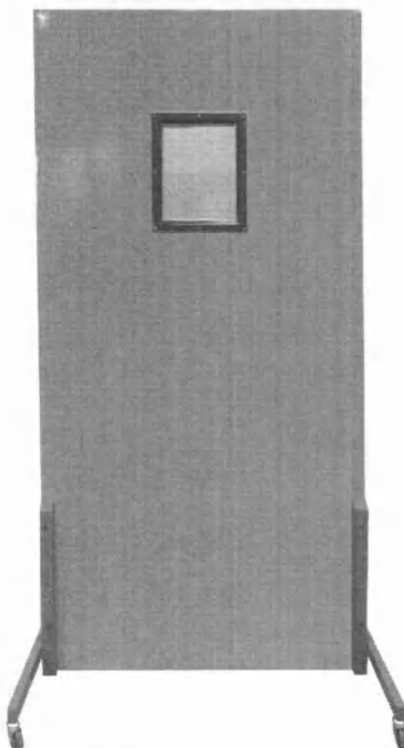


Рис.1. Ширма ШРБ МП1

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Ширма рентгенозащитная ШРБ1 зав.№ ____ (рис.1.) предназначена для защиты медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований.
- 1.2 Ширма имеет санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора России № 77.99.24.945.Д.007290.06.07 от 25.06.2007г
- 1.3 Регистрационное удостоверение № _____ от _____
- 1.4 В ширме использована оригинальная конструкция, защищенная свидетельством на полезную модель № 29801.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Габаритные размеры ширмы (ВхШхГ)..... 2000х1000х710 мм
- 2.2 Размеры секции.....1850х1000мм
- 2.3 Зазор между полом и защитным экраном 10 мм
- 2.4 Свинцовый эквивалент, при $U=100$ кВ, не менее.....мм Pb
- 2.5 Свинцовый эквивалент смотрового окна при $U=100$ кВ, не менее.....2,5 мм Pb.
- 2.6 Габаритные размеры смотрового окна:
высота мм; ширина мм
- 2.7 Масса изделия 80 кг
- 2.8 В изделии использовано в качестве рентгенозащитного материала:
– свинец листовой ДПРНМ С2 ГОСТ 9559-75,
– стекло рентгеновское защитное ТФ5 ГОСТ 9541-75.
- 2.9 Наружные поверхности изделия устойчивы к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% технического моющего средства
- 2.10 Срок службы (не менее).....5 лет

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1 Эксплуатация изделия должна производиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и требованиями СанПиН 2.6.1. 2523 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.1192-03
- 3.2 Не допускается подвергать изделие воздействиям агрессивных сред, которые могут вызывать разрушение материалов конструкции и лакокрасочного покрытия.
- 3.3 Климатические условия эксплуатации по ГОСТ 15150-82 для исполнения УХЛ.4.2., условия хранения по группе 1, транспортирование - по группе 5.
- 3.4 Периодическая проверка ширм в условиях эксплуатации осуществляется в соответствии с рекомендациями Р 42-512 в порядке производственного контроля.

Завод изготовитель:

ЗАО "Приборы и Оборудование для Научных Исследований"

Адрес : 141017 г. Мытищи, Московская область, ул. Щорса, д.19

т./ф.(495) 737-00-26, 582-28-36 т. 739-59-33; E-mail: zakaz@poni.ru

Гарантийный талон

на ремонт в течение гарантийного срока
ширмы рентгенозащитной большой ШРБ1
изготовленной по ТУ 9452-009-17459079-2002

№ _____ дата изготовления _____
(заполняется предприятием изготовителем)

Приобретена _____
(Дата реализации, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию

(Дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении потребителем правил монтажа, условия эксплуатации и хранения, установленных настоящим паспортом.**
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня изготовления.**
- 8.3 В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие или его составные части по предъявлению гарантийного талона (приложение №1).**
- 8.4 В случае отсутствия штампа торгующей организации на гарантийном талоне гарантийный срок начисляется с даты упаковки.**

- 3.5 Периодическая проверка рентгенозащитных свойств изделия производится не реже 1 раза в два года, организациями, аккредитованные в установленном порядке.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1 Перед монтажом необходимо распаковать ширму и выдержать ее в транспортном положении при комнатной температуре в рабочем помещении в течение 24 часов.
- 4.2 Произвести внешний осмотр изделия на предмет обнаружения повреждения узлов и деталей во время транспортирования.
- 4.3 Изделие может поставляться в разобранном виде. В этом случае после выполнения пп. 4.1 и 4.2 осуществите сборку ширмы, руководствуясь указаниями рис.2.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	№ поз. на рис.2.
1. Секция ширмы	ТУКЕ 305.123.006	1	1
2. Опора	ТУКЕ 301.321.003	2	3
3. Колеса 1410 РНО	050 Р30 - 10,5	4	4
4. Крепежные изделия			
- 4 Болт М10-8g x 20	ГОСТ 7798-70	4	5
- Шайба-гровер 10		4	5
- Болт М8-8g x 20	ГОСТ 7798-70	4	6
- Шайба 8		4	6
- Шайба-гровер 8		4	6
5. Паспорт	ТУКЕ 05.123.005ПС	1	

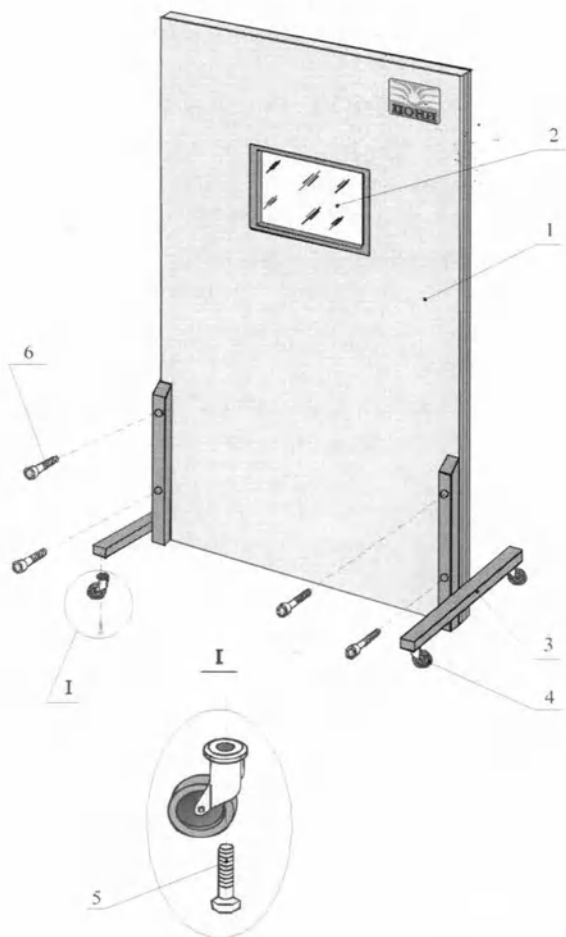


Рис.2. Схема сборки ширмы ШРБ1

1 – секция ширмы; 2 – рентгенозащитное стекло; 3 – опора; 4 – колеса;
5 – болты M10 крепления колес; 6 – болты M8 крепления опор.