

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГУП СК «Ставропольфармация»

Замчалкин Г.Н.

М.П.

«01» марта 2021 г.



***ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ***

***МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ
ОДНОРАЗОВАЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕР 17,5 СМ
Х 9,5 СМ ПО ТУ 32.50.50-001-01967939-2020***

Содержание

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МИ, РАЗРАБОТЧИКЕ МИ, АДРЕСАХ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА МИ.....	3
3. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
4. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.....	3
7. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	4
8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	4
9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
10. ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
11. ВИД И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА .	4
12. ОПИСАНИЕ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	5
13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	6
14. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	8
15. ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ.....	8
16. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.....	8
17. УПАКОВКА	10
18. МАРКИРОВКА, МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ И ЭТИКЕТОК	11
19. ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ	14
20. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	15
21. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ.....	15
22. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ	15
23. РЕКЛАМАЦИЯ.....	17

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маска медицинская нестерильная трехслойная одноразовая из нетканых материалов, размер 17,5 см х 9,5 см по ТУ 32.50.50-001-01967939-2020, в вариантах исполнения:

- плотностью 25+25+25 г/м², цвет внешнего слоя: голубой;
- плотностью 20+25+20 г/м², цвет внешнего слоя: белый;
- плотностью 17+25+17 г/м², цвет внешнего слоя: белый.

Далее по тексту: маска, изделие.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МИ, РАЗРАБОТЧИКЕ МИ, АДРЕСАХ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА МИ

ГУП СК «Ставропольфармация»

Юридический адрес: Россия, 355035, г. Ставрополь, пр.Кулакова,55.

Адрес места производства: Россия, 355035, г. Ставрополь, пр.Кулакова,55.

3. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маски предназначены для защиты органов дыхания человека от возможного заражения инфекционными заболеваниями, а также сокращению выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами.

4. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предупреждение перекрестного заражения пациентов и медицинского персонала во время эпидемии, предотвращение заражения заболеваниями, которые передаются от больного человека здоровому воздушно-капельным путем.

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Применяются как медицинским персоналом, так и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, поликлинических условиях, общественных организациях, а также в домашних условиях.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов сырья масок.

7. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты и нежелательные реакции отсутствуют. Тем не менее, маски следует использовать с осторожностью людям с ярко выраженной индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов изделия.

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Возьмите маску в обе руки и расположите ее перед лицом.

Удерживая за резинки, заведите их за уши и наденьте маску на лицо.

При необходимости растяните маску по вертикали по направлению от носа к подбородку, расправив складки, тем самым увеличив площадь прилегания маски.

Для более плотного прилегания маски, слегка надавите пальцами на гибкий носовой фиксатор, расположенный по верхнему краю маски.

Маски рекомендованы для одноразового применения.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Изделия не следует использовать после истечения срока годности, поскольку физические свойства изделий не могут далее оставаться оптимальными для целевого назначения.

Не допускается применять маски, имеющие механические повреждения, разрывы, нарушающие целостность изделия.

Не допускается применять маски при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом маски.

10. ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Заменять маску рекомендуется при необходимости, по мере ее увлажнения с внутренней стороны, а также в зависимости от внешних условий, но не позднее, чем через три часа непрерывного ношения.

Изделие применяется однократно и не предназначено для повторного использования.

11. ВИД И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

Маски относятся к изделиям, не контактирующим с организмом, по продолжительности контакта маски относятся к изделиям кратковременного контакта (менее 24 ч).

12. ОПИСАНИЕ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маски представляют собой комбинированные трехслойные изделия из нетканых материалов. Обязательная часть конструкции маски — фильтрующий элемент, который очищает воздух от микроскопических вредоносных частиц на 95 %. Для удобства предусмотрен встроенный фиксатор для носа из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающий плотное прилегание и дополнительную защиту. В производственном цикле применяется техника прокатки слоев под горячей струей пара, в результате которой материалы плотно сцепляются. Для создания не используются клей и сшивание нитями, маска получается мягкой, удобной, гибкой и не вызывает раздражений на коже. Пропускная способность маски высокая, это достигается за счет использования тончайших волокон на основе легких тканей. Конструкция масок представлена на рисунке 12.1.

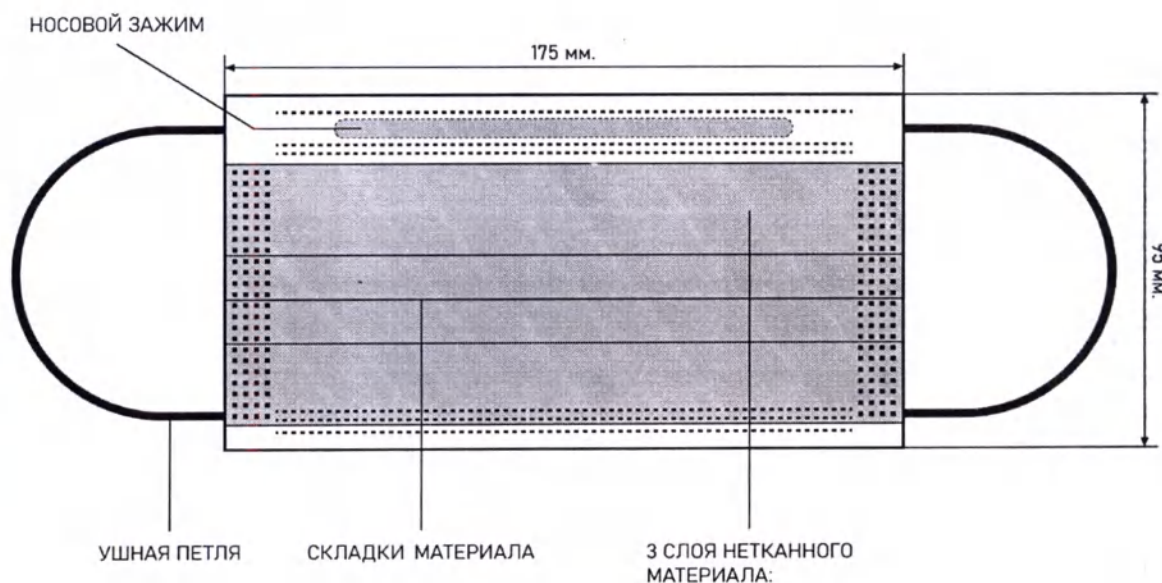


Рисунок 12.1

Представительное фотографическое изображение маски на рисунке 12.2

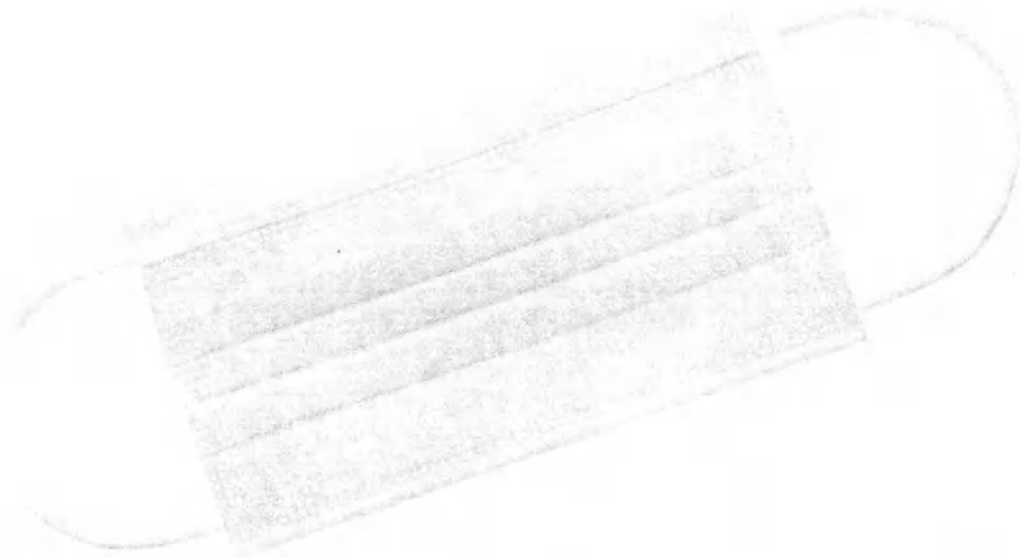


Рисунок 12.2

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики изделий приведены в таблице 13.1 и 13.2.

Таблица 13.1

Длина маски, мм	175 ± 10
Ширина маски в готовом виде, мм	95 ± 10
Ширина маски в расправленном виде, мм	160 ± 10
Длина носового фиксатора, мм	100 ± 15
Ширина носового фиксатора, мм	1,5 – 4,0
Толщина носового фиксатора, мм	0,3 - 1,2
Длина фиксирующей резинки, мм	150 ± 5
Диаметр резинки, мм	$2,5 \pm 2,0$
Глубина складок, мм	$15,0 \pm 5,0$

Таблица 13.2

Наименование параметров	Значения параметров
Масса маски, г	$2,6 \pm 0,3$
Разрывная нагрузка основы в продольном направлении, Н:	
- в сухом состоянии:	не менее 49
- во влажном состоянии	не менее 44
Общая плотность, г/м ² :	

Наименование параметров	Значения параметров
– плотностью 25+25+25 г/м ² , цвет внешнего слоя: голубой;	75,0 ± 5,0;
– плотностью 20+25+20 г/м ² , цвет внешнего слоя: белый;	65,0 ± 5,0;
– плотностью 17+25+17 г/м ² , цвет внешнего слоя: белый.	59,0 ± 5,0
Эффективность фильтрации, %	не менее 95
Дифференциальное давление, Па/см ²	не более 29,4
Микробиологическая чистота, КОЕ/г	не более 30

Состав изделий приведен в таблице 13.3.

Таблица 13.3

Наименование образца/детали/узла	Назначение образца/детали/узла (кратко)	Материалы образца/детали/узла, марки материалов и производители (в том числе и красители)
Маска медицинская нестерильная трехслойная одноразовая из нетканых материалов, размер 17,5 см х 9,5 см по ТУ 32.50.50-001-01967939-2020 вариант исполнения: плотность 25г/м ² +25г/м ² +25г/м ²	Основной материал Внешний слой (голубой)	Нетканый материал спанбонд из полипропилена плотностью 25 г/м ² Производитель – ООО «Котовский завод нетканых материалов» (ООО «КЗНМ») (Россия)
	Основной материал Средний (фильтрующий) слой (неокрашенный)	СМС плотность 25г/м ² Производитель – ООО «Котовский завод нетканых материалов» (ООО «КЗНМ») (Россия)
	Основной материал Внутренний слой (голубой)	Нетканый материал спанбонд из полипропилена плотностью 25 г/м ² Производитель – ООО «Котовский завод нетканых материалов» (ООО «КЗНМ») (Россия)
Шнур эластичный (заушная петля)	Заушная петля	Шнур эластичный, Производитель – OZEN MERKEZ OFIS (Турция)
Носовой зажим (фиксатор)	Носовой зажим (фиксатор)	Пластик, Производитель – ООО «Партнер» (Россия)
Пакет фасовочный	Потребительская	Полиэтилен низкого

Наименование образца/детали/узла	Назначение образца/детали/узла (кратко)	Материалы образца/детали/узла, марки материалов и производители (в том числе и красители)
	(индивидуальная) упаковка	давления, производитель- ИП Походин С.Н. (Россия)
Маска медицинская нестерильная трехслойная одноразовая из нетканых материалов, размер 17,5 см х 9,5 см по ТУ 32.50.50- 001-01967939-2020 вариант исполнения: плотность 20г/м ² +25г/м ² +20г/м ²	Основной материал Внешний слой (белый)	Нетканый материал спанбонд из полипропилена плотностью 20 г/м ² Производитель – ООО «Торговый Дом «Ван- Маркет» (Россия)
	Основной материал Средний (фильтрующий) слой (неокрашенный)	СМС плотность 25г/м ² Производитель – ООО «Котовский завод нетканых материалов» (ООО «КЗНМ») (Россия)
	Основной материал Внутренний слой (белый)	Нетканый материал спанбонд из полипропилена плотностью 20 г/м ² Производитель- ООО «Торговый Дом «Ван- Маркет» (Россия)
Шнур эластичный (заушная петля)	Заушная петля	Шнур эластичный, Производитель- OZEN MERKEZ OFIS (Турция)
Носовой зажим (фиксатор)	Носовой зажим (фиксатор)	Пластик, Производитель- ООО «Партнер» (Россия)
Пакет фасовочный	Потребительская (индивидуальная) упаковка	Полиэтилен низкого давления, производитель- ИП Походин С.Н. (Россия)
Маска медицинская нестерильная трехслойная одноразовая из нетканых материалов, размер 17,5 см х 9,5 см по ТУ 32.50.50- 001-01967939-2020 вариант исполнения: плотность 17г/м ² +25г/м ² +17г/м ²	Основной материал Внешний слой (белый)	Нетканый материал спанбонд из полипропилена плотностью 17 г/м ² Производитель – ООО «Спанлаб» (Россия)
	Основной материал Средний (фильтрующий) слой (неокрашенный)	СМС плотность 25г/м ² Производитель – ООО «Котовский завод нетканых материалов» (ООО «КЗНМ») (Россия)
	Основной материал Внутренний слой (белый)	Нетканый материал спанбонд из полипропилена плотностью 17 г/м ² Производитель- ООО

Наименование образца/детали/узла	Назначение образца/детали/узла (кратко)	Материалы образца/детали/узла, марки материалов и производители (в том числе и красители)
		«Спанлаб» (Россия)
Шнур эластичный (заушная петля)	Заушная петля	Шнур эластичный, Производитель- OZEN MERKEZ OFIS (Турция)
Носовой зажим (фиксатор)	Носовой зажим (фиксатор)	Пластик, Производитель- ООО «Партнер» (Россия)
Пакет фасовочный	Потребительская (индивидуальная) упаковка	Полиэтилен низкого давления, производитель- ИП Походин С.Н. (Россия)

14. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Маски могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». При перевозке открытым транспортом изделие защищают от атмосферных осадков. Погрузка, крепление, транспортирование, разгрузка изделий должны обеспечить их сохранность и исключить возможность повреждения упаковки.

Условия транспортировки: при температуре от минус 20 °С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Маски должны храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Маски должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Гарантийный срок хранения маски – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

15. ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Изделие предназначено для одноразового использования и не является стерильным. Очистка, дезинфекция и стерилизация не применимы.

16. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки масок должно входить:

- изделие и комплект документации на поставляемое изделие (инструкция по применению для потребителя).

- в индивидуальную (групповую) упаковку вкладывается 10/50/100 штук масок.

- в транспортную упаковку вкладывается, утвержденное в нормативной документации предприятия-изготовителя, количество групповых упаковок согласовывается с заказчиком и устанавливается согласно договору о поставки.

17. УПАКОВКА

В каждую упаковку упаковывают маски одного типа и размера.

Изделия укладывают в индивидуальную упаковку - пленку полиэтиленовую, далее - в транспортную упаковку - ящики из картона коробочного по ГОСТ 7933, ГОСТ Р 54463, ГОСТ 9481, ГОСТ 9142 или из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901. Количество изделий в транспортной упаковке устанавливается договором о поставке.

Фотографическое изображение индивидуальной упаковки представлено на рисунке 17.1, транспортной на рисунке 17.2.

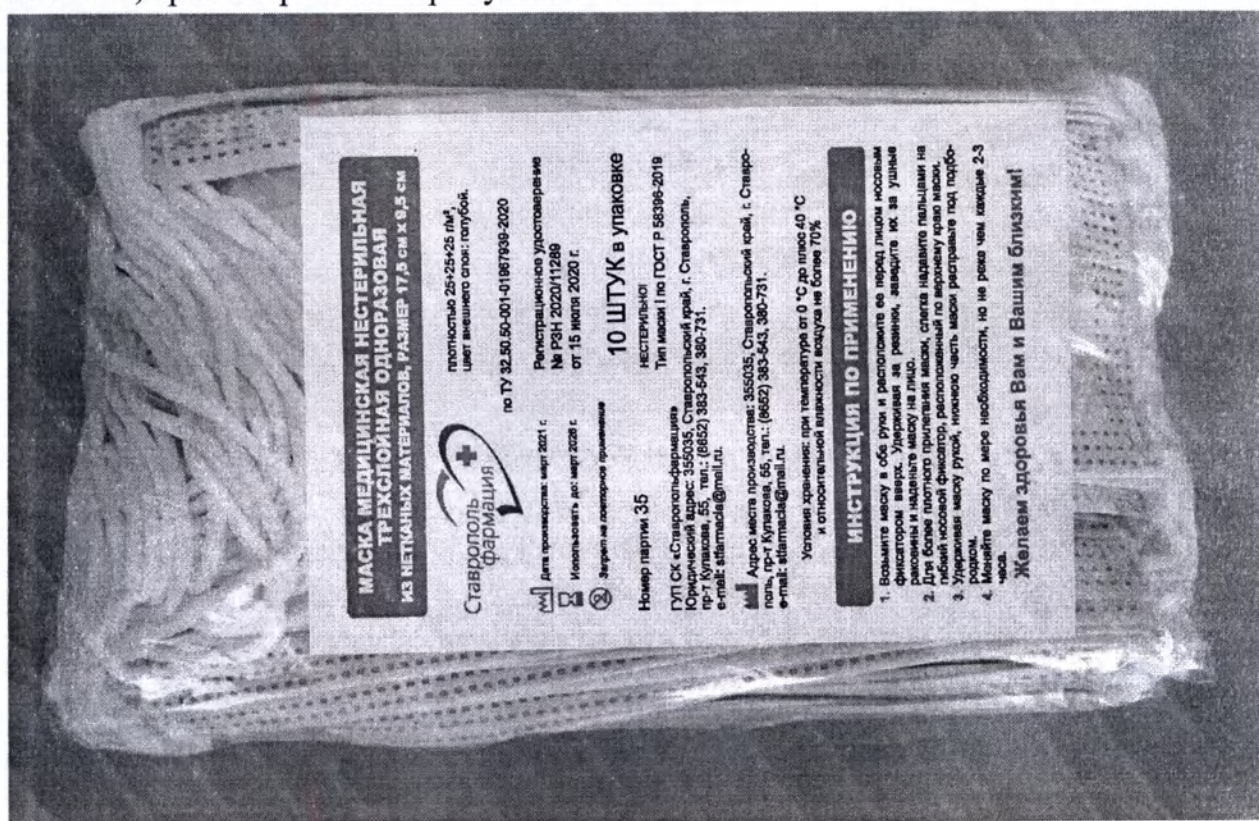


Рисунок 17.1



Рисунок 17.2

18. МАРКИРОВКА, МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ И ЭТИКЕТОК

Следующая информация указывается производителем на индивидуальной (групповой) и транспортной упаковках:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- адрес места производства;
- наименование и тип изделия;
- размер и цвет;
- количество изделий в упаковке;
- обозначение настоящих технических условий;
- срок хранения медицинского изделия (месяц, год);
- дата изготовления медицинского изделия (месяц, год);
- номер партии;
- номер и дата регистрационного удостоверения;

- информация об изделии и его использовании;
- информация о нестерильности изделия;
- условия хранения;
- тип маски;
- ГОСТ Р 58396-2019;
- запрет на повторное применение;
- символ «Беречь от влаги», «Беречь от солнца» (только для транспортной упаковки);
- информация о сертификации и декларировании (при необходимости).

В таблице 18.1 представлены символы, используемые для маркировки изделия на этикетках (индивидуальной (групповой) и транспортной).

Таблица 18.1

Символ	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Использовать до
	Запрет на повторное применение
	Не допускать воздействия солнечного света*
	Беречь от влаги*

*Символы, используемые только на транспортной упаковке

Ниже на рисунке представлен макет этикетки групповой упаковки.

**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ
ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕР 17,5 см x 9,5 см**



плотностью 20+25+20 г/м²,
цвет внешнего слоя: белый.

по ТУ 32.50.50-001-01967939-2020



Дата производства: март 2021 г.



Использовать до: март 2026 г.



Запрет на повторное применение

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/11289
от 15 июля 2020 г.

10 ШТУК в упаковке

Номер партии **35**

НЕСТЕРИЛЬНОЙ

Тип маски I по ГОСТ Р 58396-2019

ГУП СК «Ставропольфармация»

Юридический адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь,
пр-т Кулакова, 55, тел.: (8652) 383-543, 380-731.

e-mail: stfarmacia@mail.ru.



Адрес места производства: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь,
пр-т Кулакова, 55, тел.: (8652) 383-543, 380-731.

e-mail: stfarmacia@mail.ru.

Условия хранения: при температуре от 0 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха не более 70%

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Возьмите маску в обе руки и расположите ее перед лицом носовым фиксатором вверх. Удерживая за резинки, заведите их за ушные раковины и наденьте маску на лицо.
2. Для более плотного прилегания маски, слегка надавите пальцами на гибкий носовой фиксатор, расположенный по верхнему краю маски.
3. Удерживая маску рукой, нижнюю часть маски расправьте под подбородком.
4. Меняйте маску по мере необходимости, но не реже чем каждые 2-3 часа.

Желаем здоровья Вам и Вашим близким!

Ниже на рисунке представлен макет этикетки транспортной упаковки.

**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ
ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕР 17,5 см x 9,5 см**

**Ставрополь
фармация**

плотностью
25+25+25 г/м²,
цвет внешнего слоя:
голубой.

по ТУ 32.50.50-001-
01967939-2020

Дата производства: март 2021 г.

Использовать до: март 2026 г.

Запрет на повторное применение

Номер партии 35

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/11289
от 15 июля 2020 г.

1000 ШТУК в упаковке

НЕСТЕРИЛЬНО!
В индивидуальной упаковке по 10 шт

МАССА БРУТТО
3,66 кг

ГУП СК «Ставропольфармация»
Юридический адрес: 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55, тел.: (8652) 383-543, 380-731.
e-mail: stfarmacia@mail.ru.

Адрес места производства: 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55, тел.: (8652) 383-543, 380-731.
e-mail: stfarmacia@mail.ru.

Условия хранения: при температуре от 0 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха не более 70%

19. ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Маски после окончания использования могут утилизироваться как отходы класса Б в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790 и действующими на момент утилизации государственными правилами.

Неиспользованные изделия специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как бытовые отходы.

20. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие Масок требованиям настоящих технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок хранения маски – 5 лет с даты изготовления.

21. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ

Производитель проводит контроль при производстве масок на всех этапах, включающих контроль сырья для последующего производства изделий, контроль самого процесса производства, упаковки, а также контроль изделий после производства согласно спецификации в соответствии с ТУ 32.50.50-001-01967939-2020.

22. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Обозначение документа	Название документа
ГОСТ 8.423 – 81	Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.
ГОСТ 427 – 75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 6709 – 72	Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ 3813-72	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
ГОСТ 7000 – 80	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.
ГОСТ 9481-2001	Ящики из гофрированного картона для химических нитей. Технические условия.
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150 – 69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов.

Обозначение документа	Название документа
	Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ 21239 – 93	Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний.
ГОСТ 21241 – 89	Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 25336 – 82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.
ГОСТ Р 54463-2011	Тара из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия.
СанПиН 2.1.7.2790-10	"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N163).
ГОСТ 12.3.002-75 (действует до 01.07.16г.), ГОСТ 12.3.002-2014 (действует с 01.07.16 г.)	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
СП 2.2.2.1327-03	Гигиенические требования к организации тех процесса оборудованию и инструменту.
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
СанПин 2.2.4.548-96	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
ГН 2.2.5.3532-18	Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
СП 1.1.1058-01	Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Обозначение документа	Название документа
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.018-93	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ Р 58396-2019	Маски медицинские. Требования и методы испытаний
ГОСТ ISO 10993-1-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

23. РЕКЛАМАЦИЯ


ГУП СК «Ставропольфармация»

Юридический адрес: Россия, 355035, г. Ставрополь, пр.Кулакова,55.

Телефон: 8-8652-38-35-43. Почта: stfarmacia@mail.ru

В данной книге прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 17 (семнадцать) листов

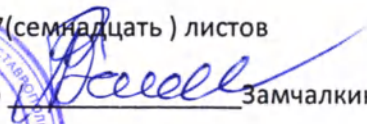Генеральный директор  Замчалкин Г.Н.

