

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Дельрус»

Федотов И.В.

«30» декабря 2020 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 504 от 11.11.2020
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМН
М В КУЛАС

Этикетка – краткая инструкция по применению
(макет)



ДЕЛЪРУС
www.delrus.ru



ООО «Дельрус»
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, корп.1, оф.64

Респиратор медицинский одноразовый
по ТУ 32.50.50-001-16126594-2020

Предназначен для наружного закрытия носовой и ротовой полости для обеспечения нормального дыхания и защиты его от воздействия патогенных биологических взвешенных в воздухе частиц во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения при организации и проведении противоэпидемических мероприятий, для защиты от риска биологического заражения патогенными микроорганизмами персонала лабораторий и медицинских учреждений, врачебного и санитарного состава персонала.

Показания к применению: для обеспечения нормального дыхания и защиты его от воздействия патогенных биологических взвешенных в воздухе частиц во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения.

Противопоказания: истекший срок годности, механические повреждения.

Возможные побочные воздействия: не выявлены.

Меры предосторожности: запрещено повторное применение.

Способ применения:

1. Вскрыть упаковку и достать респиратор из потребительской упаковки.
2. Надеть респиратор на лицо таким образом, чтобы были закрыты носовая и ротовая полости, и расправить его на лице. Необходимо обжать носовой фиксатор на переносице.
3. Зафиксировать респиратор заушными резинками.
4. Респиратор должен плотно прилегать к лицу, не допуская проникновение наружного воздуха по его периметру. При этом респиратор не должен слишком сжимать лицо.



XX.XXXX **Срок годности:** XX.XX.XXXX **№ партии:** XX.XX.XXXX

Количество: 6 шт.

Тип IIR
по ГОСТ Р 583986 – 2019

РУ № _____ от XX.XX.XXXX
номер упаковщика: _____

*С полной версией инструкции по применению Вы можете ознакомиться на сайте www.delrus.ru/info/opendata/respirator/

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (гла) л.

Генеральный директор
ООО «Дельрус»



И. Б. Федотов



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 504 от 19.11.2020
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМИ
М В КУЛЯС

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Дельрус»





_____ Федотов И.В.
«18» февраль 2021 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 504 от 19.11.2020
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМИ
М В КУЛЯС

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Респиратор медицинский одноразовый по ТУ32.50.50-001-16126594-2020



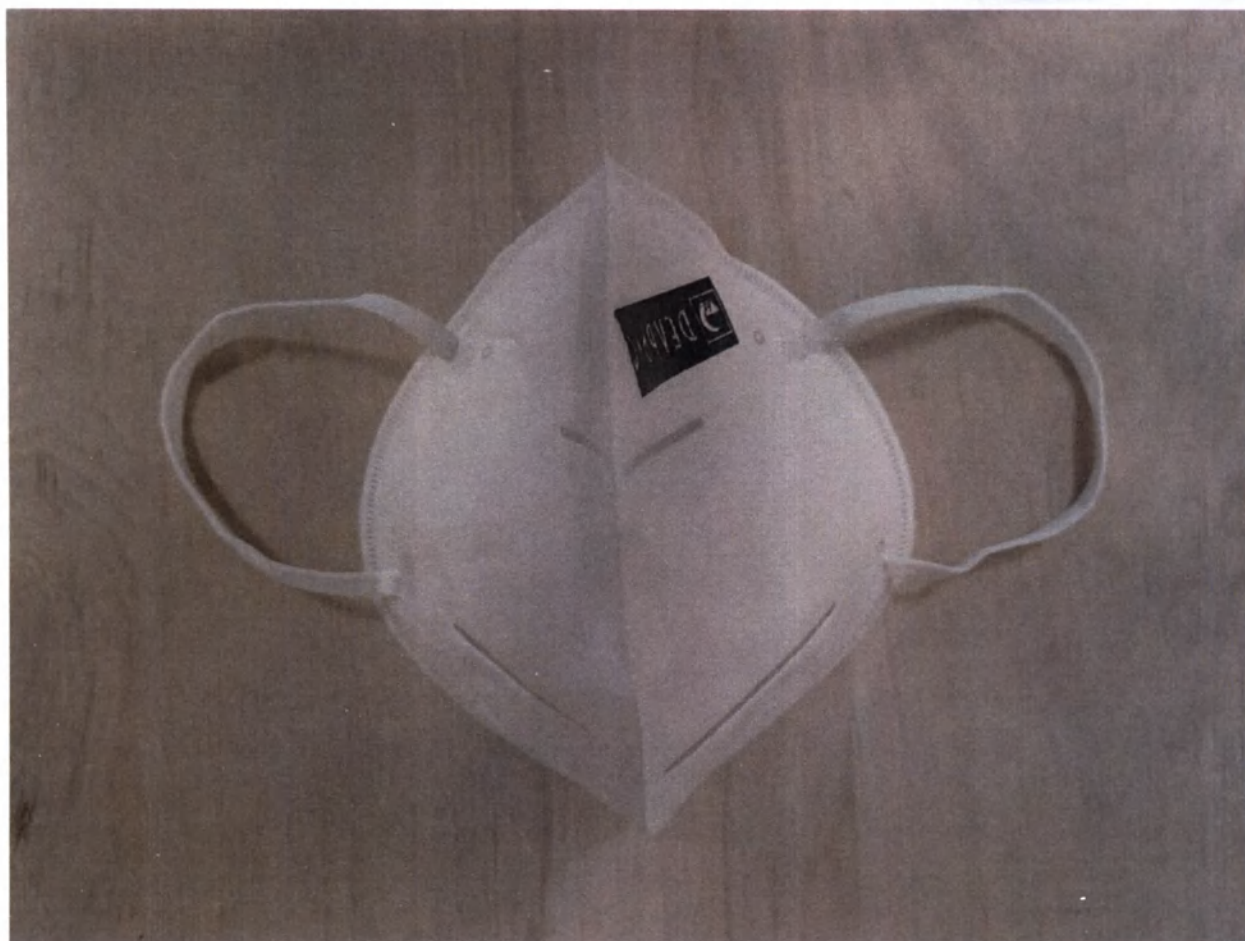

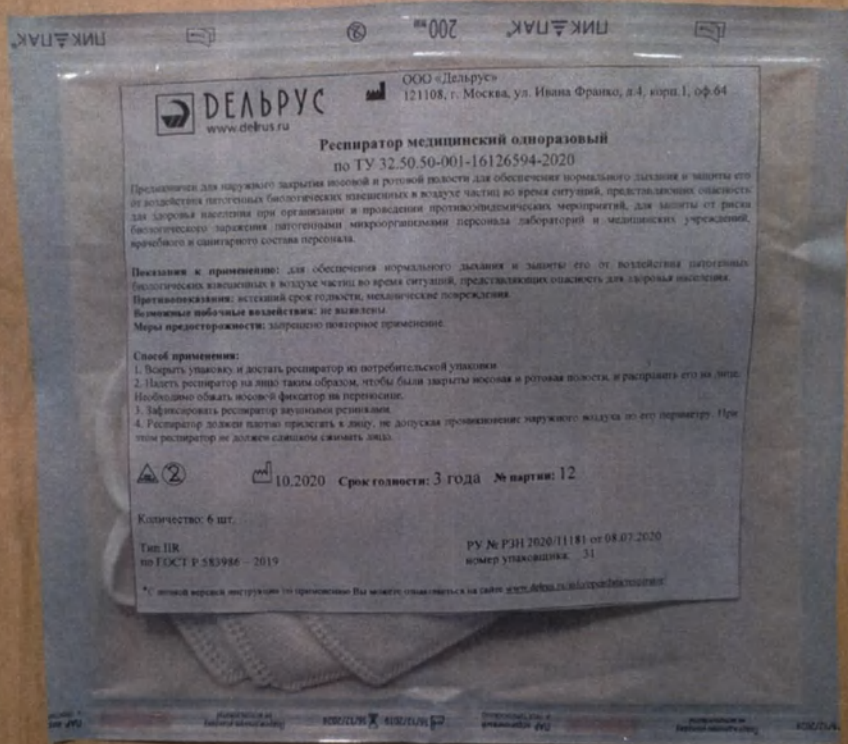



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печать

3 (три) л.

Генеральный директор
ООО «Дельрус»

И.В. Федотов



ПО ДОСТОВЕРНОСТИ
№ 504 от 10.11.2020
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМИ
В КУЛЯС