

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Производства TWINKLE STAR Traders, Пакистан

**ПАСПОРТ,
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Хирургические инструменты (в дальнейшем - инструменты), предназначены для применения при оперативных вмешательствах в общей хирургии, гинекологии, урологии, стоматологии, оториноларингологии.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1. Гарантийный срок хранения инструментов - 5 лет со дня укомплектования.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи.

3. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

3.1. Условия хранения - по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2. Предельный срок защиты без пере консервации - 5 лет.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

4.1. Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-представителю изготовителя с приложением настоящего паспорта по адресу:

420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, факс (843) 542-19-84, ПТО "Медтехника"

5. ХРАНЕНИЕ

5.1. Инструменты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 40 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха 80%. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Инструменты после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации.

6.2. Дезинфекцию инструментов проводить после мойки сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (120+4)°C в течение (45+5) мин.

6.3. Предстерилизационная очистка производится в моющем растворе "Биолот" в следующей последовательности:

1) предварительное ополаскивание под проточной водой в течение (0,5+0,1) мин.;

2) замачивание в моющем растворе при температуре (40+5)°C в течение (15+1) мин. при полном погружении;

3) мойка в течение (0,5+0,1) мин.;

4) ополаскивание под проточной водой в течение (3+1) мин.;

5) ополаскивание дистиллированной водой в течение (0,5+0,1) мин.;

6) просушивание горячим воздухом при температуре (85+2; 85-10)°C до полного исчезновения влаги.

6.4. Стерилизацию инструментов проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (180+2; 180-10)°C в течение (60+5) мин.

6.5. Допускается ручная мойка инструментов, а также мойка с использованием ультразвуковой моечной машины. Рекомендуется соблюдать осторожность при обращении с режущими частями инструментов.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инструменты признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

предприятия-представителя изготовителя на территории РФ