

Руководитель организации-
заявителя ООО «Уралпак»



РУКОВОДСТВО

по эксплуатации пакетов одноразовых из полимерных материалов для сбора,
временного хранения и удаления медицинских отходов класса «А, Б, В, Г»
(наименование изделия медицинского назначения)

2011 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на пакеты одноразовые из полимерных материалов для сбора, временного хранения и удаления медицинских отходов класса «А, Б, В, Г» в лечебно-профилактических учреждениях.

Оглавление

1. Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие
2. Описание и работа
3. Порядок использования по назначению
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт
5. Условия хранения
6. Условия транспортирования
7. Порядок утилизации

1. Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие

Для организации обращения с медицинскими отходами и повседневного контроля в крупных и средних ЛПУ приказом руководителя учреждения назначается ответственный специалист (эпидемиолог, главная медсестра, зам. главного врача по техническим вопросам), который обязан пройти обучение в специализированном центре по обращению с отходами и получить свидетельство (сертификат) установленного образца на право организации работ по обращению с отходами. В небольших ЛПУ и коммерческих учреждениях обучение проходит руководитель учреждения или его заместитель. В случае отсутствия данного специализированного центра обучение и выдачу свидетельств установленного образца осуществляет территориальный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН).

В каждом медицинском подразделении руководитель совместно с ответственным специалистом за сбор отходов в данном медицинском учреждении из имеющегося персонала назначает лицо, ответственное за сбор отходов. Данное лицо непосредственно на местах первичного сбора отходов осуществляет контроль за обращением с отходами и производит герметизацию одноразовых пакетов.

К работам, связанным со сбором, временным хранением и транспортированием отходов, не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительного обучения.

Обучение персонала правилам безопасного обращения с отходами осуществляется ответственным специалистом за сбор отходов в данном медицинском учреждении.

2. Описание и работа.

В зависимости от класса опасности медицинских отходов пакеты одноразовые имеют следующие цвета материалов:

- класс опасности «А» - цвет материала пакета белый
- класс опасности «Б» - цвет материала пакета желтый
- класс опасности «В» - цвет материала пакета красный
- класс опасности «Г» - цвет материала пакета черный

Данная окраска пакетов необходима для визуального определения принадлежности пакетов к тому или иному классу отходов.

Пакеты одноразовые из полимерных материалов для сбора, временного хранения и удаления медицинских отходов класса «А, Б, В, Г» могут быть как с

боковыми складками так и без них. Боковые складки (фальцы) применяются для увеличения объема пакета. Пакеты одноразовые могут быть трех типов:

1. Пакет с прямым дном и донным швом
2. Пакет с прямым дном и боковыми швами
3. Пакет с прямым дном, донным швом и боковыми складками (фальцами)

В зависимости от класса опасности медицинских отходов на наружной поверхности пакетов наносится путем флексопечати текстовая информация. Текст на пакетах наносится согласно требованиям СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ», а также наносится сетка для заполнения ответственными работниками ЛПУ при заполнении пакетов отходами и их герметизацией.

3. Порядок (алгоритм) использования по назначению

Сбор отходов класса «А, Б, В, Г» осуществляется в одноразовые пакеты, которые соответствуют тому или иному классу отходов. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. После заполнения пакета примерно на 3/4 из него удаляется воздух и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию. Герметизация пакета производится путем стяжки горловины пакета пластиковым хомутом-стяжкой. Хомут-стяжка выполнена из гибкого ремешка из пластмассы, имеющего на внутренней стороне насечки. Замок снабжен размещенным внутри него фиксирующим элементом в виде язычка. При прохождении хомута-стяжки через замок с образованием стягивающей петли, язычок взаимодействует с насечками по типу обратного клапана. За счет малого конечного диаметра кольца и надежного замка обеспечивается полная герметизация пакета. Герметизация пакетов может быть осуществлена любым другим способом и средствами, позволяющими обеспечить полную герметизацию. Удаление воздуха и герметизация одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках. Ответственное лицо по сбору отходов после заполнения и герметизации пакетов указывает на информационном поле пакета следующую информацию: наименование ЛПУ где собирались отходы; наименование подразделения ЛПУ где собирались отходы; ФИО ответственного лица по сбору отходов; дату сбора отходов

Заполненные одноразовые пакеты доставляются к местам установки (меж) корпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса.

Пакеты являются одноразовыми, а именно – используются методы герметизации, исключающие возможность вскрытия пакета после его заполнения отходами.

Запрещается:

- использовать пакеты вторично;
- пересыпать содержимое пакетов;

- использовать пакеты не по назначению.

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт

Данное изделие пакеты одноразовые из полимерных материалов для сбора, временного хранения и удаления медицинских отходов класса «А, Б, В, Г» в процессе хранения и использования не требует технического обслуживания и текущего ремонта.

5. Условия хранения

Упакованные пакеты должны храниться в закрытом складском помещении при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов, защищенных от прямого воздействия солнечного света, при отсутствии в помещении пылящей, кислотной и других агрессивных сред. Условия хранения должны исключить возможность механического повреждения пакетов.

6. Условия транспортирования

Пакеты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Мешки, кипы, ящики с пакетами формируют в транспортные пакеты и транспортируют по ГОСТ 26663.

7. Порядок утилизации

Пакеты одноразовые из полимерных материалов для сбора, временного хранения и удаления медицинских отходов класса «А, Б, В, Г» после их использования по назначению подлежат уничтожению в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99:

- отходы класса «А» могут быть подвергнуты термическому обезвреживанию или вывезены на специальные полигоны;
- отходы класса «Б» и «В» должны быть подвергнуты обязательному термическому обезвреживанию
- отходы класса «Г» могут быть вывезены на специальные полигоны