

Руководство по эксплуатации мостоснимателя ручного и с микромотором

производства фирмы “Anthogyr” (Франция)

Эксклюзивный дистрибьютор в России – ООО “Стоматорг”,
г. Москва – ул. Профсоюзная, 88/20; тел/факс: 330-01-44, 330-25-29,
335-82-67, 335-92-91; E-mail: mail@stomatorg.ru; Internet: www.stomatorg.ru

Состав ручного мостоснимателя.

1. Стержень с грузом.
2. Двойная насадка ATD022 с запасными струнами (только в наборе ATD310A).
3. Запасная струна для двойной насадки ATD022 (только в наборе ATD310A).
4. Простая насадка ATD012 со струной 50 мм.
5. Простая насадка ATD012 со струной 60 мм.
6. 2 запасные струны 50 и 60 мм.
7. 3 пластиковые насадки.
8. 3 анатомические насадки-крючка (1427 – для снятия коронок на премолярах, 1428 – для снятия коронок на молярах и 1429 – для снятия коронок на резцах).
9. Отвертка.
10. Запасной винт.
11. Инструмент для надежного закрепления насадок-крючков.

Инструкция по работе с мостоснимателем ручным.

Вы можете использовать подходящую для каждого конкретного случая насадку-крючок или насадку со струной.

А) Установка насадок-крючков (№8):

Ввинтите нужную Вам насадку-крючок в резьбовой разъем стержня с грузом, закрепите ее при помощи специального инструмента (№11), обеспечивая надежную фиксацию.

Б) Установка насадок со струнами (№№2,4,5):

Возьмите нужную Вам насадку со струной, проденьте свободный конец струны в межзубное пространство снимаемого моста, зафиксируйте этот конец в насадке. Для снятия длинных мостов установите несколько насадок со струной на один мост. Зафиксируйте установленную насадку в стержне с грузом в специальном разьеме, находящемся диаметрально противоположно резьбовому разьему. Вы можете произвести несколько рывков каждой насадкой, последовательно переходя от одной к другой. Это позволит избежать нежелательных перекосов при снятии моста.

В) Замена струны в насадке со струной:

При помощи отвертки (№9) отвинтите винт (№10), обеспечивающий фиксацию струны в насадке. Вставьте новую струну затупленной стороной в освободившееся отверстие и ввинтите винт, фиксируя струну.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

ПОСТАВЩИК: ООО "СТОМАТОРГ"

117485, Москва г, Профсоюзная ул, дом 88/20

РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА: ИНН 7704047449/770401001, р/с 40702810800000002009 ОАО МКБ "ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ" в г. МОСКВА, БИК 044583636, корр.сч.

30101810400000000636, тел. 101-22-85 (многоканальный), 642-64-31(32,33,34),335-44-24,330-01-44

Коммерческое предложение N 0000000812

От 3 Октября 2007 г.

ПЛАТЕЛЬЩИК: Котировочная заявка, ИНН

телефоны:

Товар по счету зарезервирован на 5 дней.

№	Код	Артикул	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка %	Цена со скидкой	Сумма без НП	Ставка НДС	Сумма НДС в т. ч.
1	90101	3913 A2	3M-Filtek Flow A2 SUPREME XT - текуч композ.мат-л низк вяз-ти,свет/отв (2 шпр.по 2г+20 нак-ков)	20	уп	880	0 %	880.00	17600	10 %	1600
2	70358	60620115	АН Plus Jet Starter Kit -мат-л для пломбирования каналов	4	шт	2030	0 %	2,030.00	8120	10 %	738.18
3	20201		Метапекс - д/постоян.пломбирования (2,2гр)	2	шт	460	0 %	460.00	920	10 %	83.64
4	10077		Endomethasone Ivory- набор (14г+10мл) (Септодонт)	8	уп	1130	0 %	1,130.00	9040	10 %	821.82
5	11636	4720 E	3M-Filtek P60 E (набор) - реставр.свет.мат-л д/жев.зубов (3 шприца)	6	шт	3090	0 %	3,090.00	18540	10 %	1685.45
6	14098	3910PE	3M-Filtek SUPREME XT (ПРОФЕССИОН. набор 12 шпр. A2D,A4D,B3D,A2B,A3B,A3,5B,A1E,A2E,A3 E,B2E,D2E,YT)	4	уп	7530	0 %	7,530.00	30120	10 %	2738.18
7	90661		Иглы карп."Nipro" 0,4x35мм, 27Gx35 Евр. (Япония)	6	уп.	140	0 %	140.00	840	10 %	76.36
8	90662		Иглы карп."Nipro" 0,4x41мм, 27Gx41мм Амер.(Япония)	14	уп	140	0 %	140.00	1960	10 %	178.18
9	20709		Стомадент-Кемфил (3 x 8 гр A3, B2, C4)	20	уп	1380	0 %	1,380.00	27600	10 %	2509.09
10	70044	630314X	Esthet-X - набор стартовый в шприцах (5 шпр.по 3г) - микроматричный композит	6	шт	6700	0 %	6,700.00	40200	10 %	3654.55
11	75124		Цитрикс Dentamerica (США)	8	уп	660	0 %	660.00	5280	10 %	480
			зет А30 - пломб.мат-л (хим.отв., паста-паста 12/12 г (Kulzer)	20	уп	1075	0 %	1,075.00	21500	10 %	1954.55

Работа с мостоснимателем.

1. Возьмите стержень с грузом.
2. а) при работе с насадкой-крючком – установите насадку-крючок, закрепленную на стержне с грузом согласно инструкции, в нужное место.
б) при работе с насадкой со струной – соедините насадку со струной, установленную на мосте согласно инструкции, со стержнем с грузом.
3. Поднимите груз на некоторую высоту и отпустите его – произойдет механическое воздействие на снимаемую коронку или мост, приводящее к снятию. Операцию можно повторить несколько раз до полного снятия. Примечание: сила воздействия зависит от высоты предварительного подъема груза относительно стержня – для создания максимального воздействия поднимите груз до упора, для промежуточной силы варьируйте высоту подъема.

Стерилизация.

Стерилизацию проводить в автоклавах при 135 градусах Цельсия в течение 20 минут.

ВАЖНО.

Сам стержень с грузом, а также все насадки должны проходить стерилизацию и дезинфекцию перед первым и после каждого последующего использования (пластиковые насадки – только дезинфекция).

Перед стерилизацией необходимо полностью удалить остатки дезинфицирующего раствора со стержня с грузом и насадок.

После установки каждой насадки тщательно проверяйте надежность фиксации

Инструкция мостоснимателя с микромотором.

Рекомендуемая скорость микромотора: 10000 – 25000 об/мин

Состав .

1. Микромоторный наконечник, имеющий стандартный микромоторный разъем – тип «Е» (ISO 3694).
2. Длинная изогнутая насадка-крючок для коронок на жевательных зубах (код – 1428).
3. Короткая изогнутая насадка-крючок для коронок на резцах (код – 1427).
4. Плоская насадка с бороздками для коронок на фронтальных зубах (код – 1429).
5. Изогнутая (90°) насадка-крючок для мостов (код – 1425).
6. Насадка со струной 50 мм для мостов на фронтальных зубах (код – АТД 012/50).
7. Насадка со струной 60 мм для мостов на жевательных зубах (код – АТД 012/60).
- 7а. Насадка со струной в виде двойной петли для керамических мостов (только в наборе 6961В), код – АТД 022.
8. Переходник для насадок со струной.
9. Две запасные струны 50 мм и 60 мм.
10. Отвертка для винта в насадках со струной.
11. Запасной винт для насадок со струной.
12. «Гаечный» ключ и стержень для усиления фиксации насадок в наконечнике.

Инструкция по работе с мостоснимателем микромоторным.

Вы можете использовать подходящую для каждого конкретного случая насадку-крючок или насадку со струной.

13	11635	6020 E	ЗМ-Filtek Z250 E (набор) - унив.реставр.мат-л свет./отв. (8 шприцев)	4	шт	5240	0 %	5,240.00	20960	10 %	1905.45
----	-------	--------	---	---	----	------	-----	----------	-------	------	---------

Итого: 202,680.00 руб.
В том числе
НДС: 18,425.45 руб.

Всего наименований 13, на сумму 202,680.00 руб.
Сумма: Двести две тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек
Исполнитель _____/Конограй/

А) Установка насадок-крючков (№№2-5):

Ввинтите нужную Вам насадку-крючок в наконечник (№1), закрепите ее при помощи двух прилагаемых инструментов (№12), обеспечивая надежную фиксацию.

Б) Установка насадок со струнами (№№6,7):

Ввинтите переходник (№8) в наконечник (№1) аналогично насадкам-крючкам. Возьмите нужную Вам насадку со струной, проденьте свободный конец струны в межзубное пространство снимаемого моста, зафиксируйте этот конец в насадке. Для снятия длинных мостов – установите несколько насадок со струной на один мост. Благодаря переходнику с «быстрым» разъемом Вы можете произвести несколько рывков каждой насадкой, последовательно переходя от одной к другой. Это позволит избежать нежелательных перекосов при снятии моста.

В) Замена струны в насадке со струной:

При помощи отвертки (№ 10) отвинтите винт (№11), обеспечивающий фиксацию струны в насадке. Вставьте новую струну затупленной стороной в освободившееся отверстие и ввинтите винт, фиксируя струну.

Работа с мостоснимателем.

1. Подключите наконечник к микромотору.
2. а) при работе с насадкой-крючком – установите насадку-крючок, закрепленную согласно инструкции в наконечнике (№1), в нужное место.
б) при работе с насадкой со струной – вставьте насадку со струной, установленную на мосте согласно инструкции, в переходник (№8), закрепленный в наконечнике (№1).
3. При помощи рычага управления микромотора обеспечьте необходимую скорость вращения (от 10 000 до 25 000 об/мин).
4. Потяните мостосниматель в нужном направлении: в тот момент, когда Вы дойдете до упора, насадка начнет совершать возвратно-поступательные движения (рывки), выполняя работу по снятию моста или коронки.

Настройки.

Вы можете увеличить/уменьшить частоту рывков мостоснимателя при помощи увеличения/уменьшения скорости вращения микромотора.

Амплитуду и силу рывков можно изменять, вращая кольцо на наконечнике.

Смазка, дезинфекция и стерилизация.

Рекомендуется смазывать наконечник перед каждым использованием. Применяйте спрей в течение одной секунды (максимум). Масло должно проникнуть, прочистить и смазать инструмент полностью.

Рекомендуется только дезинфекция поверхности. НЕ погружайте наконечник в дезинфицирующие растворы.

Стерилизацию проводить только в автоклавах при 135 градусах Цельсия в течение 20 минут.

ВАЖНО.

Сам наконечник, а также все насадки должны проходить стерилизацию и дезинфекцию перед первым и после каждого последующего использования.

Перед стерилизацией необходимо полностью удалить остатки дезинфицирующего раствора с наконечника и насадок.

После установки каждой насадки тщательно проверяйте надежность фиксации.