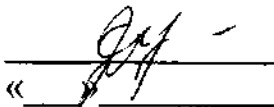


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Стоматорг»

 Э.Х. Девлетбаева
« _____ » 2008 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Устройство для карпульной и интралигаментарной анестезии»
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наименование изделия – устройство для карпульный и интралигаментарной анестезии, предназначенный для различных видов дентальной анестезии с использованием карпульных анестетиков.


Инструкция по использованию:


1. Потяните за поршень на себя до упора, согните шприц пополам.
2. Вставьте карпулу с анестетиком в магазин и разогните шприц.
3. Поверните поршень по часовой стрелке на один оборот для того, чтобы штопор вошел в силиконовую часть карпулы.
4. Наверните нужную карпульную иглу на резьбу шприца (европейский стандарт).
5. Для проведения аспирации потяните поршень на себя.


Дезинфекция и стерилизация.

1. Дезинфекцию проводите перед первым использованием и после каждого использования.
2. Тщательно промойте и просушите изделие перед стерилизацией.
3. Стерилизуйте разобранный шприц в автоклаве 20 минут при 135 градусах Цельсия, или в сухожаре 60 минут при 180 градусах Цельсия.
4. Храните изделие в стерильном и сухом месте.

Генеральный директор
ООО «Стоматорг»

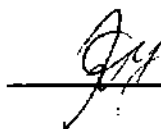
 Э.Х.Девлетбаева

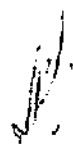

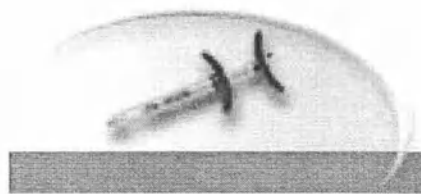

Шприцы для карпульной интралигаментарной анестезии

1) Стандартные

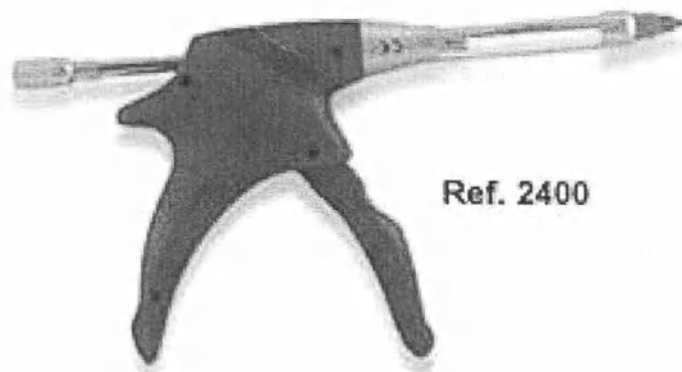

Ref. 2400

Впрыск – 0,2 мл

2) Для детской стоматологии



Ref. 2300

Впрыск – 0,1 мл