



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«МирБах»

ИНН 7604319970 КПП 760401001 ОГРН 1177627003817

150023, г.Ярославль, ул.Гагарина, дом 64Д, лит.А1, оф.7 Р/С 40702.810.8.77030010263 банк Северный банк ПАО Сбербанк г.Ярославль БИК 047888670

к/сч № 30101810500000000670

тел. 8 (4852) 20-66-66 Email mirbah76@yandex.ru

**Инструкция по применению
медицинского изделия**

**Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые
по ТУ 32.50.50-001-06621128-2017**

в вариантах исполнения: «Эконом», «Стандарт», «Прочные», «Особо прочные»

Назначение: Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-001-06621128-2017 в вариантах исполнения: «Эконом», «Стандарт», «Прочные», «Особо прочные» (далее – бахилы) предназначены для препятствия проникновения грязи и влаги, а с ними и болезнетворных микроорганизмов, с обуви персонала и пациентов во внешнюю среду.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, а также другие учреждения, требующие обязательное пользование медицинскими бахилами, как одним из средств личной гигиены медицинского персонала и пациента.

Показания к применению: бахилы надеваются на обувь сразу при входе в различные медицинские учреждения для поддержания чистоты и соблюдения санитарных норм, сохранения стерильности и чистоты в больницах, роддомах, медицинских центрах, поликлиниках, химических лабораториях, стоматологических клиниках.

Противопоказания к применению и побочные эффекты: не выявлены.

Потенциальные потребители: бахилы применяются персоналом и пациентами любых возрастных категорий, без ограничения по состоянию здоровья для поддержания чистоты и соблюдения требований гигиены в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений, а также в других учреждениях и в быту.

Описание: Бахилы по внешнему виду представляют собой чехлы из пленки с гладкой или текстурированной поверхностью, изготовленные из полиэтилена различной плотности марки РЕ66148С производства ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», Россия (ТУ 2211-145-05766801-2008) с припаянной сверху резинкой (нить латексная оплетенная, производства ООО «ИнкомТекс» (ТУ 2514-001-05838883-2016), оплетена нитью полиэфирной текстурированной текстильной некрученной, производства ОАО «СветлогорскХимволокно», Республика Беларусь (ТУ ВУ 400031289.129-2007). Бахилы должны быть сшиты по форме ноги и фиксируются при помощи резинок. Крепление резинок осуществляется машинным способом. В верхней части бахил резинка (или две

резинки) подается на два края пленки, после чего полиэтилен подгибается и сваривается по всей длине, а затем место соединения резинки фиксируется термосваркой.

Внешний вид бахил должен соответствовать рисунку 1.

Бахилы выпускаются в следующих вариантах исполнения по цвету:

- синий;
- зеленый;
- желтый
- розовый.

При изготовлении используются следующие марки красителей:

Суперконцентраты красителей (Masterbatch):

- синий, марки PE 82338C, изготовитель «Malion», Китай
- зеленый, марки 6086, изготовитель «Prayag Polytech Pvt Ltd», Индия;
- желтый, марки 3053, изготовитель «Prayag Polytech Pvt Ltd», Индия;
- красный, марки 5089, изготовитель «Prayag Polytech Pvt Ltd», Индия;

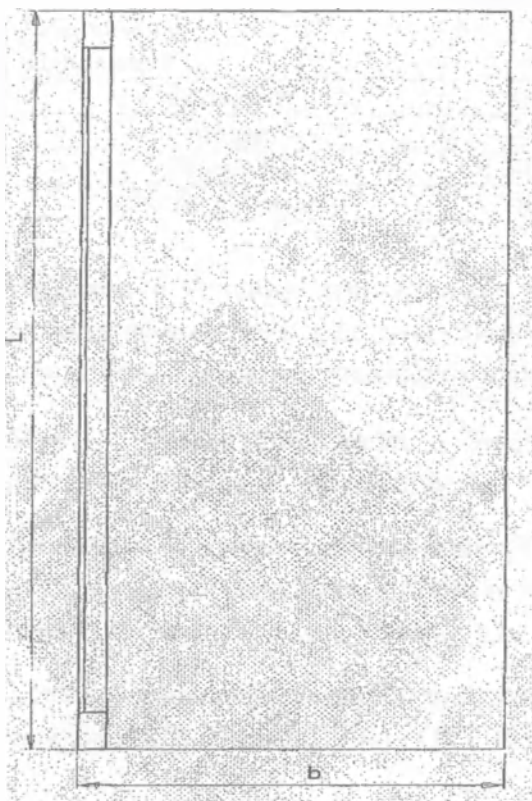


Рисунок 1.

Бахилы в количестве 1 пара или 100 пар должны быть упакованы в произвольной форме в пакеты из полимерных материалов по ГОСТ 12302. Края должны быть запаяны.

При покупке важно учитывать размер и предполагаемое время ношения, в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

Обозначение исполнений	Параметры	Толщина материала, мкм	Время ношения, не менее, час
«Эконом»		14±0,2	1
«Стандарт»		18±0,2	1,5
«Прочные»		26±0,2	2,0
«Особо прочные»		30±0,2	2,5

Размеры, масса: Габаритные размеры и масса бахил должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Обозначение исполнений	Параметры	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Масса, 1 шт., г
«Эконом»		400±10	150±10	2,2±0,2
«Стандарт»		400±10	150±10	3,2±0,2
«Прочные»		400±10	150±10	4,2±0,2
«Особо прочные»		400±10	150±10	4,9±0,2

Порядок и условия применения: извлечь бахилы из первичной упаковки, растянуть резинку по ширине и надеть на уличную обувь, начиная с носка.

Применять в любых медицинских учреждениях и домашних условиях.

Меры предосторожности: Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению.

Хранение и транспортирование: Транспортирование изделий должно производиться любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования изделий вида климатического исполнения УХЛ 4.2 - по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Изделия в упаковке предприятия должны храниться на складах поставщика по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Запрещено хранить и транспортировать бахилы рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами обладающими сильным запахом (бытовая химия). Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м.

Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

Утилизация: Упаковку, а так же использованные/не использованные или с истекшим сроком годности бахилы утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А или вместе с бытовыми отходами.

Гарантия изготовителя: ООО ПП «МирБах»

150023, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 64Д, лит. А1, оф. №7

Тел.: 8 (4852) 20-66-66

Изготовитель гарантирует соответствие Бахил медицинских одноразовых полиэтиленовых по **ТУ 32.50.50-001-06621128-2017** заявленным свойствам в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования.

Срок годности бахил - 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Не использовать по истечении срока годности.

Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с момента приобретения.

Бахилы применяют одноразово, не требуется сервисное, техническое обслуживание и ремонт.

Директор
М.П.



Предтеченский М.А.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (четыре)

1 листа(ов)

Хорошевский

Ф.И.О.

Хорош

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИРБАХ»
ПРЕДПРИЯТИЕ
личная подпись

Ярославль