



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медтехника-Р»

Катая В.В.

2020 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровати медицинские механические по
ТУ 32.50.30-21-98238288-2020,
зарегистрированный товарный знак MED-MOS,
в вариантах исполнения

2020

СОДЕРЖАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
ПРОИЗВЕДИТЕЛЬ	6
НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	6
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	6
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	6
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	6
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	7
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	7
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	7
РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	7
ВИД КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА	7
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	9
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ	11
УПАКОВКА	11
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	11
РАСПАКОВКА И ОСМОТР	12
РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ	12
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	15
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧИСТКА И РЕМОНТ.	21
УТИЛИЗАЦИЯ	23
ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	23
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	23
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:	24
ГАРАНТИЯ	24
ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ	25
РЕКЛАМАЦИЯ	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	27

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кровати медицинские механические по ТУ 32.50.30-21-98238288-2020, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, в вариантах исполнения

1. Тип 1 (регулировка секции спины единой)
 - Вариант 1.1
2. Тип 1.2 (регулировка секции спины единой) + секция туалетного выреза
 - Вариант 1.2.1
3. Тип 2 (регулировка секции спины единой и ножной единой секции)
 - Вариант 2.1
4. Тип 2.1 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной единой секции) + боковое переворачивание
 - Вариант 2.1.1
5. Тип 2.2 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной единой секции)
 - Вариант 2.2.1
6. Тип 2.3 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной единой секции) + боковое переворачивание
 - Вариант 2.3.1
7. Тип 2.4 (регулировка секции спины единой и ножной единой секции) + секция туалетного выреза
 - Вариант 2.4.1
8. Тип 2.5 спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной единой секции) + боковое переворачивание + секция туалетного выреза
 - Вариант 2.5.1
9. Тип 2.6 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной единой секции) + секция туалетного выреза
 - Вариант 2.6.1
10. Тип 2.7 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной единой секции) + боковое переворачивание + секция туалетного выреза
 - Вариант 2.7.1
11. Тип 3 (Без регулировки)
 - Вариант 3.1
12. Тип 4 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную))
 - Вариант 4.1
13. Тип 4.1 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + боковое переворачивание
 - Вариант 4.1.1
14. Тип 4.2 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + без бокового переворачивания + поддержка секции спины
 - Вариант 4.2.1

15. Тип 4.3 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + боковое переворачивание + поддержка секции спины
– Вариант 4.3.1
16. Тип 4.4 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + секция туалетного выреза
– Вариант 4.4.1
17. Тип 4.5 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + боковое переворачивание + секция туалетного выреза
– Вариант 4.5.1
18. Тип 4.6 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + без бокового переворачивания + поддержка секции спины + секция туалетного выреза
– Вариант 4.6.1
19. Тип 4.7 ((регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + боковое переворачивание + поддержка секции спины + секция туалетного выреза
– Вариант 4.7.1
20. Тип 6 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции))
– Вариант 6.1
21. Тип 6.1 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции (разделение на ножную, ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + боковое переворачивание
Вариант 6.1.1
22. Тип 6.2 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножную неподвижную секцию, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + без бокового
– Вариант 6.2.1
23. Тип 6.3 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + боковое переворачивание + поддержка секции спины
– Вариант 6.3.1
24. Тип 6.4 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + секция туалетного выреза
– Вариант 6.4.1
25. Тип 6.5 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции (ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + боковое переворачивание + секция туалетного выреза
– Вариант 6.5.1
26. Тип 6.6 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + боковое переворачивание + поддержка секции спины + секция туалетного выреза
– Вариант 6.6.1

27. Тип 6.7 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икрожно-опорную секции)) + боковое переворачивание + поддержка секции спины + секция туалетного выреза

– Вариант 6.7.1

28. Тип 7 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икрожно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза

– Вариант 7.1

29. Тип 7.1 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икрожно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание

– Вариант 7.1.1

30. Тип 7.2 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножную неподвижную секцию, бедренно-икроножную и икрожно-опорную секции)) + боковое переворачивание + поддержка секции спины

– Вариант 7.2.1

31. Тип 7.3 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икрожно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание + поддержка секции спины

– Вариант 7.3.1

32. Тип 7.4 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икрожно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание + секция туалетного выреза

– Вариант 7.4.1

33. Тип 7.5 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икрожно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание

– Вариант 7.5.1

34. Тип 7.6 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икрожно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание + поддержка секции спины + секция туалетного выреза

– Вариант 7.6.1

35. Тип 7.7 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икрожно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание + поддержка секции спины + секция туалетного выреза

– Вариант 7.7.1

Принадлежности:

1. Изголовье/ изножье: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8 – не более 2 комплектов.

2. Боковые ограждения: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10 – не более 2 комплектов.

3. Привод – не более 5 комплектов.
4. Рама для подтягивания: Встраиваемая Тип 1, Встраиваемая Тип 2, Передвижная Тип 1, Передвижная Тип 2 – не более 2 комплектов
4. Туалетное устройство: Тип 1 – не более 1 шт.
5. Прикроватный столик: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 – не более 2 штук
6. Инфузионная стойка: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11 – не более 2 шт.
7. Колеса и тормозная система: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10 – не более 1 шт.
9. Ручка управления туалетным устройством – не более 1 шт.
10. Ручки управления механического привода – не более 5 шт.
11. Ванночка для головы - не более 1 шт.
11. Матрас – не более 2 штук

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК» (ООО «Медтехника-Р»)
125222, Россия, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещение X

E-mail: info@rebotec.net

Место производства:

1. Hengshui new century medical devices co., ltd (№ 588 West of FuYang Road, JiZhou District, Heng Shui Citi, Hebei Province China)

Jizhou Dingli Medical Apparatus and Instrument CO., LTD (No.588, Chang'An E. Road, Jizhou District, Hengshui City (In the Yard of Hebei Jixing Pharmaceutical Packaging Company))

3. SHANGHAI PINXING Medical Equipment Co., Ltd! (No.238 Gongxiang Road, Baoshan district, 201901, Shanghai, China)

4. ООО «Медтехника-Р»

Адрес: Россия, 141401, г. Химки, Коммунальный проезд, владение 30

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кровать медицинская (далее по тексту «кровать») предназначена для использования в больничных стационарах и ухода за пациентами в домашних условиях.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Подвижность секций позволяет легко поменять положение больного в заданной зоне без нарушения неподвижности остальных частей тела
- Металлические части конструкции кровати обработаны ударопрочной эпоксидной эмалью с целью повышения устойчивости изделия к коррозии и для более легкой гигиенической обработки
- Легкосъемные торцы и боковые поручни для удобства ухода за пациентом

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Для применения в условиях больниц и стационаров, а также в домашних условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Стационары медицинских учреждений
- Социальные учреждения различных типов
- Уход за пациентами в домашних условиях

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

- Тяжелобольные и лежащие пациенты
- Пациенты, нуждающиеся в постельном режиме в послеоперационный период
- Пациенты с тяжкими недугами внутренних органов, ампутациями, переломами
- Медицинский персонал
- Люди, осуществляющие уход за пациентом

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению медицинского изделия при условии соблюдения правил пользования не выявлено.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочных действий от использования медицинского изделия при условии соблюдения правил пользования не выявлено.

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Данная информация содержится в Отчете по управлению рисками. Настоящий отчет представляет собой краткую характеристику управления рисками. В отчете оцениваются все возможные убытки и причины их возникновения, а также серьезность ущерба и каждый соответствующий результат.

ВИД КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

Кратковременный контакт с кожей человека.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В зависимости от степени потенциального риска применения изделия относится к классу 1 по ГОСТ 31508.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» – 120210.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Строго соблюдайте требования, указания и рекомендации, содержащиеся в настоящем Паспорте изделия
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающей кроватью.
- Перед использованием проверяйте корректность функционирования всех подвижных частей кровати, проверяйте надежность затяжки крепежных элементов и отсутствие ослабленных соединений, убедитесь в отсутствии в помещении помех (мебель, стены, подоконники и т.п.), препятствующих нормальному функционированию кровати
- Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия на наличие видимых дефектов и повреждений. При обнаружении повреждений, влияющих на безопасность эксплуатации изделия, или при возникновении посторонних шумов в процессе работы незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кровать, указанную на заводской наклейке. Запрещено вставать и сидеть на отдельно поднятых секциях, опираться на торцевые ограждения или иным образом перегружать кровать. Повреждения изделия, полученные в результате превышения нагрузки, не являются гарантийным случаем.

- Избегайте попадания посторонних предметов и частей тела между движущимися элементами конструкции кровати в процессе эксплуатации, это может привести к травме или повреждению оборудования
- Избегайте чрезмерного натяжения, спутывания, перекручивания или повреждения (в том числе – движущимися частями кровати) электрических проводов и провода пульта управления (при наличии).
- При наличии электрических приводов гибридного типа (с возможностью вращения привода механической рукоятью при отсутствии электропитания): перед началом использования механической рукоятки убедитесь, что кабель питания кровати отключен от розетки сети переменного тока.
- Тормоза колес стоящей кровати (при наличии) должны быть заблокированы. Разблокировка колес производится только при необходимости перемещения кровати.
- Не допускается перемещение кровати при заблокированных колёсах.
- Не допускается перемещение кровати вместе с пациентом, это может привести к травмам.
- Не допускается перемещение кровати за боковые ограждения.
- Колеса на кровати предназначены для её передвижения на короткие расстояния по твердому ровному полу внутри помещения, в котором установлена кровать. Не допускается использование кровати вне помещений, перемещение по её грунту и другой несоответствующей поверхности.
- Во избежание повреждений, избегайте ударов и столкновений кровати с твердыми предметами при её перемещении.
- Использование кровати в качестве каталки, для перемещения между помещениями, по коридорам, перекатывание кровати через препятствия порошкового типа, выбоины в полу и иные большие неровности расценивается как использование кровати не по назначению и может послужить основанием для отказа в гарантийном ремонте.
- Запрещается размещение не предусмотренных конструкцией предметов или оборудования на раме кровати или ее использование в качестве опоры для человека.
- В случае когда необходимо оставить пациента без присмотра, поднимите боковые ограждения и приведите положение кровати в нулевую позицию: все секции ложа расположены горизонтально, ложе кровати опущено в крайнее нижнее положение (при наличии функции регулировки высоты ложа).
- В процессе эксплуатации кровать следует содержать в чистоте
- Утилизировать изделие после окончания срока службы и упаковку после сборки необходимо согласно правилам и нормам, предусмотренным законодательством страны эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики изделия приведены в Приложении 1.

Масса изделий должна быть, в зависимости от варианта исполнения и дополнительного оснащения, не более 140 кг.

Изделия выдерживают равномерно распределенную номинальную нагрузку, массой до 250 кг.

Боковые ограждения в вертикальном и горизонтальном положении выдерживают нагрузку не более 15 кг.

Значение усилия, необходимого для перемещения по ровной поверхности, составляет не более 45 Н.

Максимальное усилие для торможения ведущих колес, прилагаемое к рычагу тормоза, составляет не более 60 Н.

Ведущие колеса вращаются на горизонтальной оси без заеданий при приложении усилия, значение которого составляет не более 0,35 Н, а в заторможенном состоянии проворачиваются при приложении усилия, значение которого составляет (150 ± 1) Н.

Поворотные колеса изделия являются самоориентирующимися и проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий.

Характеристики изделия приведены в Приложении 1.

МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие	Материал	Марка	Производитель
Ложемент	АБС пластик	ABS 417k	Heng shui Kai Wen Plastic co.,ltd
	Полипропилен	200K	Ba Zhou Qing Yuan Plastic
	Полипропилен	200K	Ba Zhou Qing Yuan Plastic
	Сталь с порошковым покрытием	Q195	Hebei Bazhou Wantong
	Массив дерева		Guangdong zhongshan xingshanchuan Co LTD
	Алюминиевый сплав	6063	He bei Lang Fang Da Cheng Zhong Jin
Изголовье/Изножье	Массив дерева	-	Guangdong zhongshan xingshanchuan Co LTD
	АБС пластик	ABS 417k	Heng shui Kai Wen Plastic co.,ltd
	Полипропилен	200K	Ba Zhou Qing Yuan Plastic
	ЛДСП	601	Shan Dong Xin Li Da
	Нержавеющая сталь	201	He Bei Jin Hui Hong Peng
	Искусственная кожа	AW 07	PEGASO
	HPL	HPL12	Jizhou Dingli Medical Apparatus and Instrument CO., LTD
	Алюминий	6063	He bei Lang Fang Da Cheng Zhong Jin
Рама для подтягивания	Сталь с порошковым покрытием	Q195	Hebei Bazhou Wantong
	Нержавеющая сталь	201	He Bei Jin Hui Hong Peng
	Полиэстер	P 965	Jizhou Dingli Medical Apparatus and Instrument CO., LTD
	Пластик	ABS DG-417	Tian Jin DaGu Chemical co.,ltd

Боковые ограждения	АБС пластик	ABS 417k	Heng shui Kai Wen Plastic co.,ltd
	Полипропилен	200K	Ba Zhou Qing Yuan Plastic
	ЛДСП	6357	Jizhou Dingli Medical Apparatus and Instrument CO., LTD
	Алюминий	6063	He bei Lang Fang Da Cheng Zhong Jin
	Сталь с порошковым покрытием	202	He Bei Jin Hui Hong Peng
	Нержавеющая сталь	201	He Bei Jin Hui Hong Peng
Инфузионная стойка	Нержавеющая сталь	201	He Bei Jin Hui Hong Peng
	Алюминий	6063	He bei Lang Fang Da Cheng Zhong Jin
	Пластик	PP B8101	SINOPEC
Матрас	ПВХ	1300	Ning bo Xiang Ling
Колеса	Полиуретан	PP665	Jizhou Dingli Medical Apparatus and Instrument CO., LTD
	ПВХ	SG-5	ShanXi Bei Yuan Chemical co.,ltd
	Пластик	ABS DG-417	Tian Jin DaGu Chemical co.,ltd
	Сталь	195	Tian Jin ZhongTong
Ванночка для головы	Пластик	Polypropylene511	SINOPEC
Прикроватный столик	Пластик	PP B8101	SINOPEC
	Сталь	202	He Bei Jin Hui Hong Peng
	HPL	HPL12	Jizhou Dingli Medical Apparatus and Instrument CO., LTD
	Алюминий	6063	He bei Lang Fang Da Cheng Zhong Jin
	ЛДСП	6357	Jizhou Dingli Medical Apparatus and Instrument CO., LTD
	МДФ	MLx	Guangdong zhongshan xingshanchuan Co LTD
Ручка управления туалетным устройством	Алюминий	6063	He bei Lang Fang Da Cheng Zhong Jin
	Пластик	PP B8101	SINOPEC
Ручка управления механическим приводом	Алюминий	6063	He bei Lang Fang Da Cheng Zhong Jin
	Пластик	PP B8101	SINOPEC
Туалетное устройство	Пластик	511	SINOPEC

	Сталь с порошковым покрытием	Q195	Hebei Bazhou Wantong
--	------------------------------	------	----------------------

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Символ	Значение	Символ	Значение	Символ	Значение
	Предупреждение		Продукт подлежит утилизации в специальном пункте утилизации		Обратитесь к Руководству по эксплуатации
	Код партии		Хрупкое, обращаться осторожно		Температурный барьер
	Код партии		Серийный номер		Дата производства
	Ограничение влажности		Хранить в сухом месте		Не допускать попадания прямых солнечных лучей
					Не использовать вблизи открытого огня

УПАКОВКА

Изделие поставляется к потребителю в сборном, частично собранном или разобранном виде и упаковывается по ГОСТ Р 50444-92.

Перед использованием транспортная тара проверена на чистоту и отсутствие других материалов. Для защиты изделий от механических повреждений в местах соприкосновения изделий друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами применяются вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Условия транспортировки и хранения

Температура окружающей среды $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность $\leq 95\%$

Атмосферное давление $500 \sim 1060$ гПа

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды $10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность $\leq 80\%$

Атмосферное давление $700 \sim 1060$ гПа

Хранение должно осуществляться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей, воды и взаимодействия медицинского изделия с агрессивными веществами.

Допускается транспортировка всеми видами транспорта.

РАСПАКОВКА И ОСМОТР

Перед распаковкой необходимо проверить коробку и другие упаковочные материалы на наличие каких-либо видимых повреждений. В случае обнаружения внешних повреждений упаковки необходимо сообщить об этом грузоотправителям или местному представительству.

Осторожно извлеките все части из коробки.

Изучите внешний вид медицинского изделия на соответствие критериям чистоты, отсутствие вмятин, царапин и иных повреждений. Осмотрите все комплектующие.



ВНИМАНИЕ!

Если медицинское изделие длительное время находилось при низких температурах, перед эксплуатацией его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ


1. Сборка кровати

(для моделей тип 1 и тип 2)

1.1. Откройте коробку, снимите упаковку. Для последующих операций вскрывать упаковку удобнее таким образом, чтобы кровать лежала ложем вверх.



1.2. Ложе кровати аккуратно поставьте на бок. Извлеките принадлежности и проверьте комплектацию кровати.

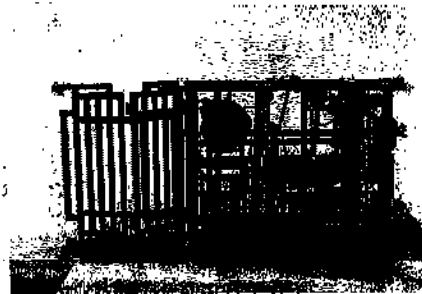

Внимание! Не используйте для вскрытия упаковки острые предметы во избежание получения травм и причинения вреда деталям изделия.

1.3. Для моделей ТИП 1 и ТИП 2 с колёсами.

Вкрутите оси колёс в нижние резьбовые отверстия ножных опор. Чтобы колесо при вкручивании не проворачивалось, заблокируйте его, нажав на рычаг тормоза. Вкрутите колесо до упора, не прилагая больших усилий, после чего обязательно надёжно затяните гайку на оси ключом (ключ в комплект не входит).





1.4. Не разблокируя тормозов колес, переверните кровать и поставьте ее на ножки (на колеса).
Внимание! Риск травмирования. Для данной операции требуется не менее 2-х человек.


1.5. Регулировка туалетного устройства (производится при необходимости):

1.6. Для моделей ТИП 1 и ТИП 2 с механическим приводом туалетного устройства и туалетным судном без крышки:

А) Установите судно на передвижную платформу туалетного устройства и проверьте работу механизма, нажимая на кнопки открытия и закрытия туалета на пульте управления.





Б) При необходимости отрегулируйте ход туалетной секции: извлеките шплинт на конце тяги туалетной секции, выведите тягу из зацепления с пластиной поворотной трубы и вкручивайте или выкручивайте её для регулировки плотного закрытия туалетной секции. Добившись нужного положения, снова вставьте конец тяги в отверстие пластины поворотной трубы и зашплинтуйте его.

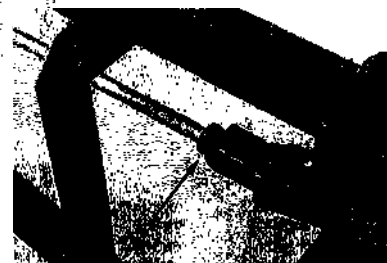


2. Установка изголовья и изножья (для моделей ТИП 2 и ТИП 1)

Для установки быстросъёмных изголовья и изножья служат зацепные штыри, установленные на углах рамы кровати. В зависимости от требований заказчика они могут быть как съёмные, так и несъёмные. Если кровать укомплектована съёмными опорными штырями (опция), то перед установкой изголовья и изножья прикрутите их болтами, входящими в комплект поставки, к торцу рамы кровати в имеющиеся отверстия, в соответствии с типом изголовья или изножья.

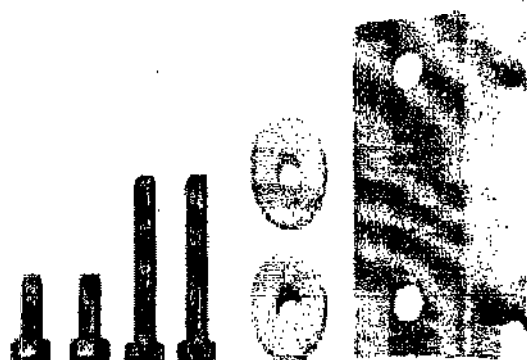

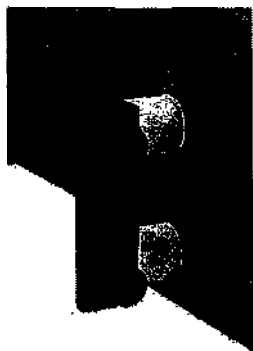

Установите быстросъемные кронштейны на изголовье и изножье, (в случае если они съемные) используя крепеж, входящий в комплект поставки:

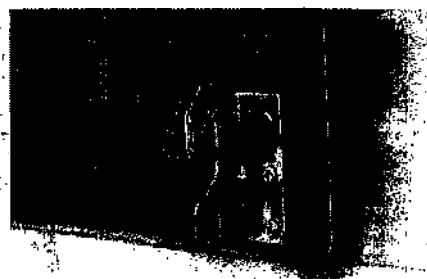


Установите на зацепные штыри изголовье и изножье кровати, предварительно подняв флажки фиксаторов.

Опуская фиксаторы, вы блокируете изголовье и изножье кровати, от их случайного снятия.





3. Установка дополнительного оборудования (для моделей ТИП 1 и ТИП 2)



В зависимости от требований заказчика кровать может быть укомплектована боковыми ограждениями, дугой для подтягивания, трансфузионной стойкой, прикроватным и/или накроватным столиком и прочими аксессуарами.

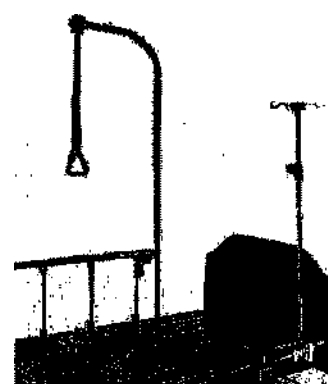

3.1. Закрепите боковые ограждения (опция) к раме кровати имеющимися болтами крепления. Боковые ограждения следует устанавливать замком блокировки с головной стороны кровати, хотя конструкцией допускается установка и обратным способом.

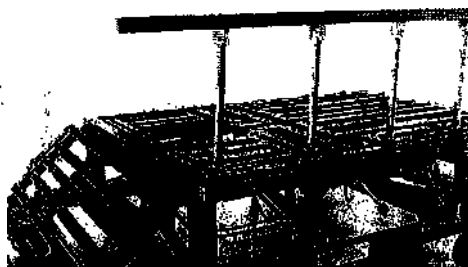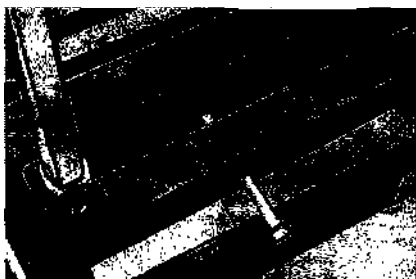

3.2 Вставьте дугу для подтягивания (опция) и трансфузионную стойку (опция) в соответствующие отверстие, расположенные в торцевых участках рамы кровати. Отверстия для трансфузионной стойки могут иметь пластиковые вставки-стаканы (опция). Дуга для подтягивания фиксируется винтом барашкового типа с внутренней стороны рамы кровати или винтом снизу (в зависимости от модели). Трансфузионная стойка фиксируется в металлическом или пластиковом стакане за счёт плотной посадки либо винтом снизу (в зависимости от модели).

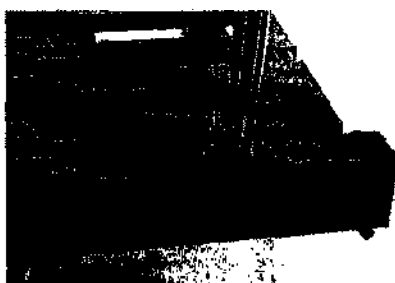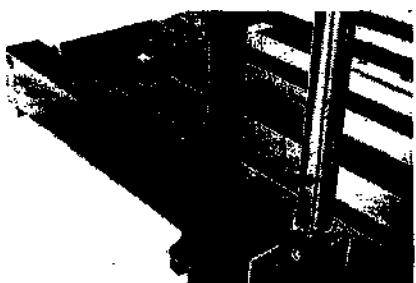

3.3 Подготовка к эксплуатации (для моделей ТИП 1 и ТИП 2)

Перед началом эксплуатации обработайте поверхность изделия дезинфицирующим раствором или протрите влажной тканью. Убедитесь, что все соединительные элементы надежно закреплены. Кровать готова к эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием необходимо проверить надежность крепления кровати и корректном функционировании регуляторов положения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип регулировки секции и функции	Особенность регулировки	Номер регулировки
Секция спины	механическая	1
Секция спины	электрическая	2 (неприменимо)
Ножная секция (все элементы ножной секции, управляемые механическим приводом)	механическая	1
Ножная секция (все элементы ножной секции, управляемые электрическим приводом)	электрическая	2 (неприменимо)
Ножная секция (все элементы ножной секции, управляемые растоматом)	растомат	3
Регулировка высоты кровати	механическая	1
Регулировка высоты кровати	электрическая	2 (неприменимо)
Туалетное устройство	механический рычаг	4
Туалетное устройство	электрическая	2 (неприменимо)


Функция бокового переворачивания	механическая	1
Функция бокового переворачивания	электрическая	2 (неприменимо)
Боковая поддержка секции спины	автоматическая	5
Анатомическая поддержка секции таза	автоматическая	5
Снятие торцевых ограждений	Фиксаторы	6
Регулировка боковых ограждений (спинки)	кнопочный механизм складывания	7
Регулировка боковых ограждений (спинки)	Откидные газлифты	8
Регулировка рамы для подтягивания	ручная регулировка высоты	9
Регулировка инфузионной стойки	Барашковый фитинг	10
Регулировка инфузионной стойки	Пластиковая стяжная ручка	11
Регулировка тормозной системой	Индивидуальный тормоз	12
Регулировка тормозной системой	Центральный тормоз	13
Сигнализация при опрокидывании колеса	автоматическая	5
Аккумулятор	Встроенный автоматический	5
Функция выравнивания	автоматическая	2
Встроенная система выравнивания позволяет измерять угол наклона стола большого мотора из положения кровати на 15° и с помощью датчиков боковых ограждений и торцевых панелей		
Функция запоминания позиции (Автоматическое позиционирование 30°)	электрическая	2 (неприменимо)
Возможность сохранить заданную позицию углов наклона секции на пульте управления		
Секция удлинения до 50 см	Выдвижная секция на двух направляющих	14
Функция увеличения жизненного пространства (увеличения расстояния между торцевыми ограждениями) до 105 мм	Угловые фиксаторы	6
Ночная подставка спинки кровати	Встроенные LED лампочки	2
LED (от 1 до 30)		
«Авторыгрессия»	автоматическая	
При подъеме секции спины и бедер из положения автоматически отодвигаются от секции таза и тазобедренный компрессор, задающий высоту положения бедер		
Функция «Положение 0»	электрическая	2 (неприменимо)
Возврат всех секций ложа кровати в горизонтальное плоское положение с одновременным опусканием до минимальной высоты нажатием 1 кнопки		
Функция "Автоконтур"	электрическая	2 (неприменимо)
Функция "Автоконтур"	механическая	1
Синхронная регулировка угла наклона секции спины и бедер нажатием 1 кнопки/ Синхронная регулировка угла наклона секции спины и бедер с помощью одной ручки		
Функция Тренделенбург/Анти-Тренделенбург	механическая	1
Функция Тренделенбург/Анти-Тренделенбург	электрическая	2 (неприменимо)
Установка ложа кровати в положение, при котором голова и плечевой пояс пациента располагаются ниже таза /		

Установка ложа кровати в положение, при котором голова и плечевой пояс пациента располагаются выше таза		
Перевод секции ложа в положение CPR	электрическая	2 (неприменимо)
Перевод секции ложа в положение CPR	Механический рычаг	1
Независимый от электропитания экстренный перевод спинной секции в горизонтальное положение для Сердечно-Легочной Реперфузии		
Функция "Позиция Фаулера"	электрическая	3 (неприменимо)
Благодаря секциям с регулируемым углом наклона, пациент, находясь в постели, может принимать так называемую позицию Фаулера — поза когда плечи и голова приподняты примерно на 45-60° над горизонтальным уровнем, а колени слегка согнуты.		
Функция "Кардиокресло"	механическая	1
Функция "Кардиокресло"	электрическая	2 (неприменимо)
Возможность придать пациенту положение сидя за счет подъема спинных и опускания ножных секций ниже уровня ложа		
Противоположная функция	электрическая	2 (неприменимо)
Возможность автоматического переворачивания пациента с одного бока на другой при помощи секции бокового переворачивания Интервал: от 15 до 45 минут опционально		
Блокировка функции бокового переворачивания при поднятой спинной секции		
Автоматическая блокировка функций бокового переворачивания при поднятых спинных секциях		
Латеральный наклон	электрическая	2 (неприменимо)
Функция латерального наклона под углом 15° облегчает процедуру поворота пациента с минимальным риском получения травм спины		



Регулировка «№ 1»

Для управления механическими функциями кровати под номером 1, в непосредственной близости от регулирующего гнезда или ручки управления на кровати расположены интуитивно понятные обозначения регулируемых секций.

Для регулировки функций необходимо вставить ручку в соответствующее гнездо и вращайте ее по часовой или против часовой стрелки до достижения нужного пациенту положения. Если ручка установлена стационарно в кровать, необходимо ее просто перевернуть в сторону необходимого направления.

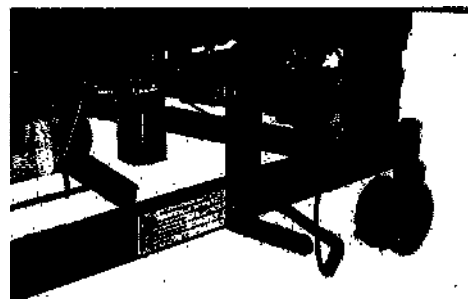

Если пациент хочет воспользоваться туалетным устройством самостоятельно* (только для моделей с механическим туалетным устройством), не прибегая к помощи других лиц, необходимо вставить ручку управления туалетным устройством в отверстие, расположенное сверху с левой стороны ложа кровати. Поверните рычаг для достижения нужного положения туалетного устройства (открыто или закрыто).

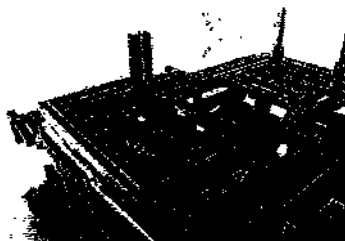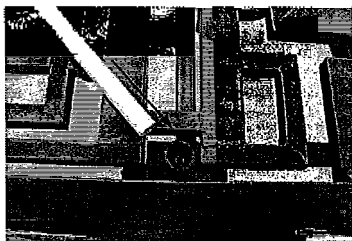


**наличие данной функции уточняется при заказе.*

Регулировка «№2»

Неприменимо к механическим кроватям!

Регулировка «№ 3»

Для управления функцией растомата необходимо потянуть за регулируемую секцию до принятия искомого положения.


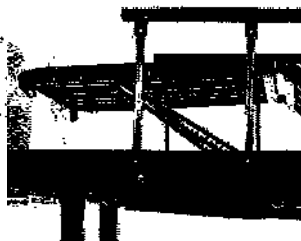


Внимание! Убедитесь, что секция зафиксирована.

Для перевода секции в исходное положение необходимо приподнять секцию и плавным движением без скачков опустить ее в горизонтальное положение.

Регулировка «№ 4»


Для регулировки функции механического туалета, необходимо надавить за рычаг туалетного устройства до упора, пока туалетное судно не окажется доступно для использования пациентом. При регулировке платформы судна, автоматически открывается секция туалетного выреза. Будьте внимательны, если пациент в этот момент находится на кровати.

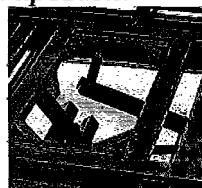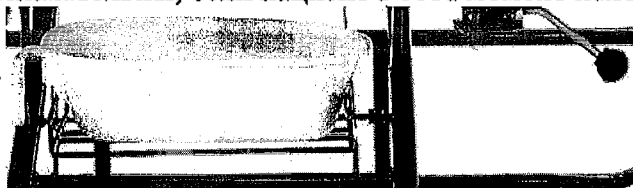

Для закрытия секции туалетного выреза и высвобождения туалетного судна необходимо потянуть за рычаг туалетного устройства до тех пор, пока секция туалетного выреза не закроется полностью, а туалетное судно будет доступно для изъятия.

Внимание! Убедитесь, что секция туалетного выреза зафиксирована в горизонтальном положении

Если пациент хочет воспользоваться туалетным устройством самостоятельно (наличие функции уточняется при заказе), не прибегая к помощи других лиц, необходимо вставить ручку управления туалетным устройством в отверстие, расположенное сверху с левой стороны ложа кровати. Поверните рычаг для достижения нужного положения туалетного устройства (открыто или закрыто).

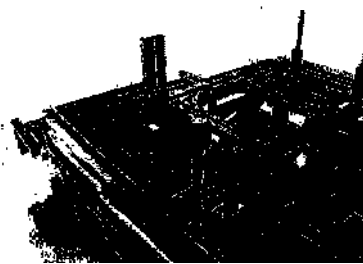

Регулировка «№ 5»

Регулировка функций № 5 происходит автоматически, в основном, при взаимодействии с другими функциями.

Регулировка «№ 6»

Если кровать укомплектована съёмными опорными штырями (опция), то перед установкой изголовья и изножья прикрутите их болтами, входящими в комплект поставки, к торцу рамы кровати в имеющиеся отверстия, в соответствии с типом изголовья или изножья.



Регулировка «№ 7»

Боковые ограждения фиксируются автоматически при подъёме в крайнее верхнее положение. Замок блокировки издаёт при этом характерный щелчок.

Внимание! Риск падения. Если щелчок не прозвучал, это означает, что боковое ограждение не зафиксировано, и может опуститься. Пациент может упасть с кровати. Если боковое ограждение перестало фиксироваться, следует вызвать специалиста для проведения технического обслуживания или обратиться в сервисный центр для устранения неисправности.

Расфиксация замка производится нажатием на рычаг, после чего боковые ограждения складываются до нижнего положения.



Внимание! Не используйте боковые ограждения в качестве опоры. Максимально допустимая нагрузка в вертикальном и горизонтальном направлении - не более 15 кг.

Регулировка «№ 8»

Чтобы опустить боковые ограждения необходимо потянуть замок блокировки вниз. Боковые ограждения опустятся с помощью газлифтов.

Боковые ограждения фиксируются автоматически при подъёме в крайнее верхнее положение. Замок блокировки издаёт при этом характерный щелчок.

Внимание! Риск падения. Если щелчок не прозвучал, это означает, что боковое ограждение не зафиксировано, и может опуститься. Пациент может упасть с кровати. Если боковое ограждение перестало фиксироваться, следует вызвать специалиста для проведения технического обслуживания или обратиться в сервисный центр для устранения неисправности.



Внимание! Не используйте боковые ограждения в качестве опоры. Максимально допустимая нагрузка в вертикальном и горизонтальном направлении - не более 15 кг.

Регулировка «№ 9»


Дуга для подтягивания служит для помощи пациенту самостоятельно принимать необходимое положение. **Внимание!** Риск падения. Решение пользоваться дугой для подтягивания следует принимать индивидуально в каждом конкретном случае.

Дуга для подтягивания может быть установлена с правой или левой стороны головной части кровати.

Внимание! Перед эксплуатацией дуги для подтягивания убедитесь, что она надежно зафиксирована на раме кровати и не поворачивается под нагрузкой.

Для регулировки высоты дуги (наличие данной функции уточняется при заказе) необходимо использовать барашковый винт.

Регулировка длины ремня осуществляется с помощью регулирующей скобки.

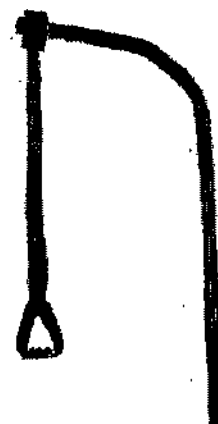

Регулировка «№ 10»

Для регулировки высоты инфузионной стойки с помощью барашкового винта необходимо расфиксировать барашковый винт вращая его в сторону, пока верхняя часть трубы не начнет свободно двигаться. Отрегулировав стойку до необходимой длины, необходимо затянуть винт обратно.

Внимание! Проверьте надежность фиксации стойки перед ее использованием



Регулировка «№ 11»



Для регулировки высоты инфузионной стойки с помощью пластиковой затяжной ручки необходимо расфиксировать пластиковую затяжную ручку вращая ее в сторону, пока верхняя часть трубы не начнет свободно двигаться. Отрегулировав стойку до необходимой длины, необходимо затянуть ручку обратно.

Внимание! Проверьте надежность фиксации стойки перед ее использованием



Регулировка «№ 12»

Для фиксации индивидуального тормоза, необходимо нажать на педаль тормоза до упора. Для полной фиксации кровати необходимо задействовать все тормоза. Для расфиксации тормоза необходимо поднять зафиксированную педаль вверх или использовать педаль расфиксации тормоза (в зависимости от типа тормозной системы)

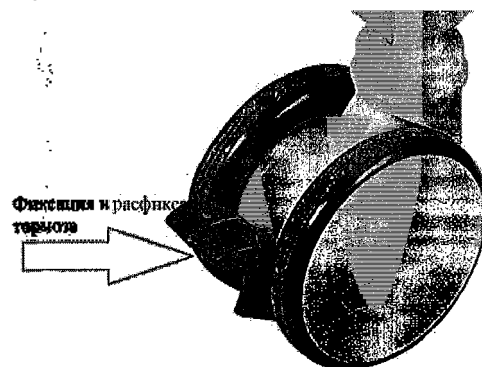
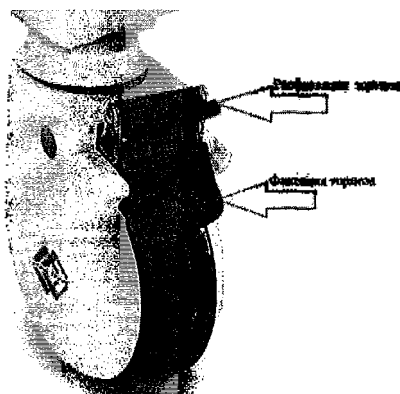


Внимание! Убедитесь, что кровать крепко зафиксирована на месте, прежде чем положить на нее пациента

Регулировка «№ 13»


Для фиксации центрального тормоза, необходимо нажать на педаль тормоза до упора. Для полной фиксации кровати необходимо задействовать все тормоза. Для расфиксации тормоза необходимо поднять зафиксированную педаль вверх или использовать педаль расфиксации тормоза (в зависимости от типа тормозной системы)

Внимание! Убедитесь, что кровать крепко зафиксирована на месте, прежде чем положить на нее пациента

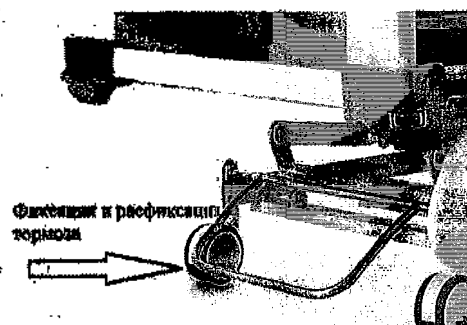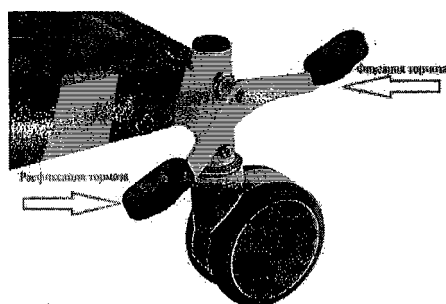


Регулировка «№ 14»

Для удлинения ложа необходимо потянуть ножную секцию /секцию спины с двух сторон на необходимое расстояние.

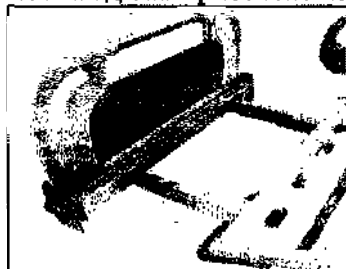

Регулировка «№ 15»

Для перевода секции ложа в положение CPR необходимо потянуть за красный рычаг CPR.

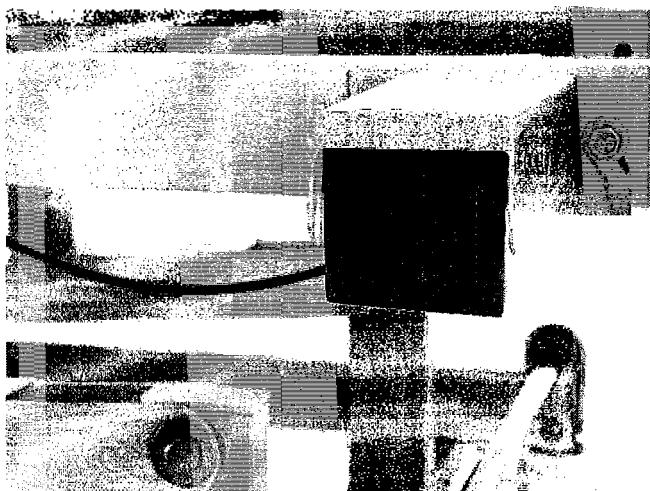

! Не забудьте поддерживать спинную секцию во избежание резкого падения пациента.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧИСТКА И РЕМОНТ.

Если изделие долгое время не используется, его нужно проверять не реже, чем раз в 3 месяца.

Механические подвижные части изделия должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.

Регулярно проверяйте силовые узлы подъёмных механизмов на наличие смазки, с интервалом не реже 1 раза в 2 недели. При необходимости, но не реже, чем 1 раз в 6 месяцев смазывайте смазкой аэрозольной глубокого проникновения.

В случае обнаружения неисправностей см. раздел 5 настоящего паспорта. Изделие, неисправности которого не могут быть устранены пользователем, должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами или возвращено производителю.

Запрещается использование изделия с признаками неисправностей.

В процессе эксплуатации изделие следует содержать в чистоте, своевременно обрабатывая растворами моющих средств на водной основе или дезинфицирующими средствами по МУ 287-113.

Допускается использовать мягкие моющие средства и дезинфицирующие составы, не содержащие агрессивных химических веществ. Соблюдайте инструкции производителя по использованию средства или состава.

Чистить изделие протирачным материалом (мягкой тканью, микрофиброй, салфетками и т.п.).

Используйте достаточное, но не чрезмерное количество воды и/или дезинфицирующего состава. При необходимости удалите лишнее количество воды и состава. Чистить следует, переходя от наиболее загрязнённых деталей изделия к наименее загрязнённым, периодически промывая или заменяя протирачный материал.

После обработки удалите остатки состава и дайте изделию полностью высохнуть перед использованием.

Внимание! Не используйте в качестве протирачного материала абразивные и металлические губки и им подобные приспособления, не применяйте острые предметы, способные нарушить защитный слой, нанесённый на изделие, т.к. это может привести к повреждению изделия.

Внимание! Не используйте составы для чистки и дезинфекции, содержащие абразивные и/или агрессивные добавки, способные нарушить защитный слой изделия, т.к. это может привести к его повреждению.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация кровати и ее составных частей, в том числе контактирующих с телом пациента, проводится согласно правилам и нормативов СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» как отходы класса А.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Данный продукт не содержит никаких вредных веществ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При регулировки механической рукоятки кровати соответствующие функции не выполняются	Неправильно соединены элементы привода	Проверьте правильность соединения элементов привода. Если не помогло, обратитесь в сервисный центр
Подъем секций работает не в соответствии с пиктограммами управления рукояток механической кровати	Перепутаны местами пиктограммы.	Наклейте верные обозначения вместо ошибочных. Если не помогло, обратитесь в сервисный центр
Посторонние шумы во время работы механического привода	Привод требует обслуживания или замены	Внимание! Не пытайтесь отремонтировать привод самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
Посторонние шумы во время работы линейного актуатора	Актуатор требует обслуживания или замены	Внимание! Не пытайтесь отремонтировать актуатор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
Механический привод работает только в одном направлении	Привод требует обслуживания или замены	Внимание! Не пытайтесь отремонтировать привод самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
Боковое ограждение не фиксируется в поднятом положении	Не сработал замок блокировки ограждения	Поднимите боковое ограждение до момента срабатывания замка (до щелчка). Если замок блокировки неисправен, обратитесь в сервисный центр

Колесо не ставится на тормоз или не блокируется	Не нажат рычаг тормоза на колесе блокировке	Нажмите рычаг на колесе. Если блокировка тормоза неисправна, обратитесь в сервисный центр
Дуга для подтягивания поворачивается в посадочном месте	Дуга не зафиксирована винтом	Зафиксируйте винтом барабашкового типа или винтом снизу (в зависимости от крепления)
Трансфузионная стойка свободно качается в посадочном месте	Стойка ошибочно установлена в отверстие дуги для подтягивания	Переставьте стойку в отверстие для трансфузионной стойки и закрепите плотной посадкой или винтом снизу (в зависимости от способа крепления)
Механический привод не опускает или не поднимает секцию ложа.	Неправильно соединены элементы привода	Проверьте правильность соединения элементов привода. Если не помогло, обратитесь в сервисный центр

Внимание! Если предпринятые действия не помогают устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Комплектность поставки определяется при заказе и в него входят:

Название	Количество, шт.
Кровать в вариантах исполнения	1
Принадлежности:	
Изголовье/изножье	не более 2 комплектов
Боковые ограждения	не более 2 комплектов
Привод	не более 5 комплектов
Рама для подтягивания	не более 2 комплектов
Туалетное устройство	1 комплект
Прикроватный столик	не более 2 штук
Инфузионная стойка	не более 2 штук
Колеса и тормозная система	не более 2 комплектов
Ручка управления туалетным устройством	1
Ручка управления механическим приводом	не более 5 штук
Ванночка для головы	не более 1 штуки
Матрас	не более 2 штук

Пример маркировки:

Кровать медицинская механическая по ТУ 32.50.30-21-98238288-2020, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, в вариантах исполнения

Кровать Тип 4.7 Вариант 4.7.1

Размеры:

2065 – 2175*980*820 мм

Масса: 77.1 кг

Максимально допустимая нагрузка: 250 кг

Производитель:

ООО «Медтехника-Р» 125222, Москва г, Генерала Белобородова ул, дом № 35/2, этаж 1, пом. X

Производство:

ООО "Медтехника-Р", Россия, 141400, г. Химки, Коммунальный проезд, владение 30.

Номер партии: 1366547-20

Дата производства: 09.20



Регистрационное удостоверение № _____ от _____



*Допускается нанесение дополнительной информации, необходимой для идентификации товара, в том числе знаков соответствия национальным стандартам, а также знаков соответствия Регламенту (-ам) Евразийского экономического союза после прохождения обязательных процедур оценки соответствия.

** Информация может быть указана на как на этикетке, так и на самом изделии

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при выполнении требований настоящего паспорта; за исключением быстроизнашивающихся деталей и повреждений, причинённых вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника-Р» с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев. При обращении потребителя по гарантии, гарантия на замененные детали и узлы действует до окончания основного срока гарантии на изделие.

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника-Р» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Срок службы 5 лет, изготовлено из перерабатываемых материалов, не загрязняющих окружающую среду.

Адрес для направлений претензий и рекламаций

ООО «Медтехника-Р»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, этаж 1, помещение X

тел. (495) 504-26-51, факс (495)504-26-53, e-mail info@rebotec.net

Номер регистрационного удостоверения _____ дата _____

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ

Обозначение	Наименование
МУ-287-113	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

Приказ № 4н от 06.06.2012 Минздрава России	"Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (вместе с "Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам", "Номенклатурной классификацией медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения") (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2012 N 24852)
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия.
ГОСТ ISO 10993-1-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.
СанПиН 2.1.7.2790-10	"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".
ГОСТ 31508	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

РЕКЛАМАЦИЯ

Заявление в ОТК (заполняется клиентом)


1. Наименование/ФИО покупателя
2. Контактные данные уполномоченного лица покупателя
3. Номер и дата документа, по которому покупатель получил товар
4. Краткое описание проблемы (с любыми касающимися дела подробностями)
5. Приложения и фотодетализация
 - копия гарантийного талона с отметкой продавца, накладной и чеком, если товар куплен не напрямую в ООО "Медтехника-Р"
 - фото товара, проблемных деталей и/или участков
 - фото маркировки (наклейка/стикер, нанесённый на изделие на производстве)
 - фото ненарушенной упаковки (обязательно при выбраковке в процессе приемки товара от транспортной компании)
6. Дата обращения и подпись

Производитель оставляет за собой право изменить конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя. Иллюстрации, приведенные в данном паспорте, носят информационный характер и являются ориентировочными. Комплектация и вид изделия могут отличаться от приведенных на фото


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Внешний вид медицинского изделия


Тип 1

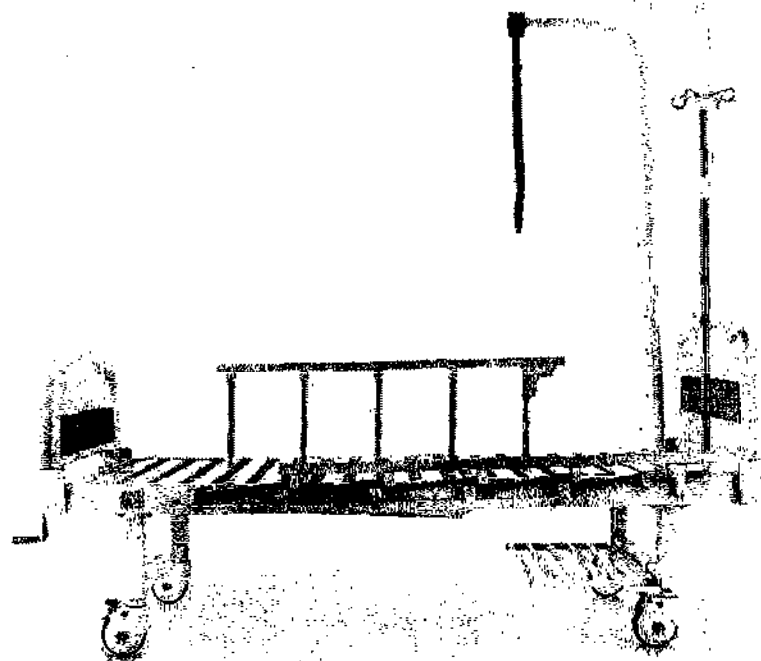


Тип 1.2

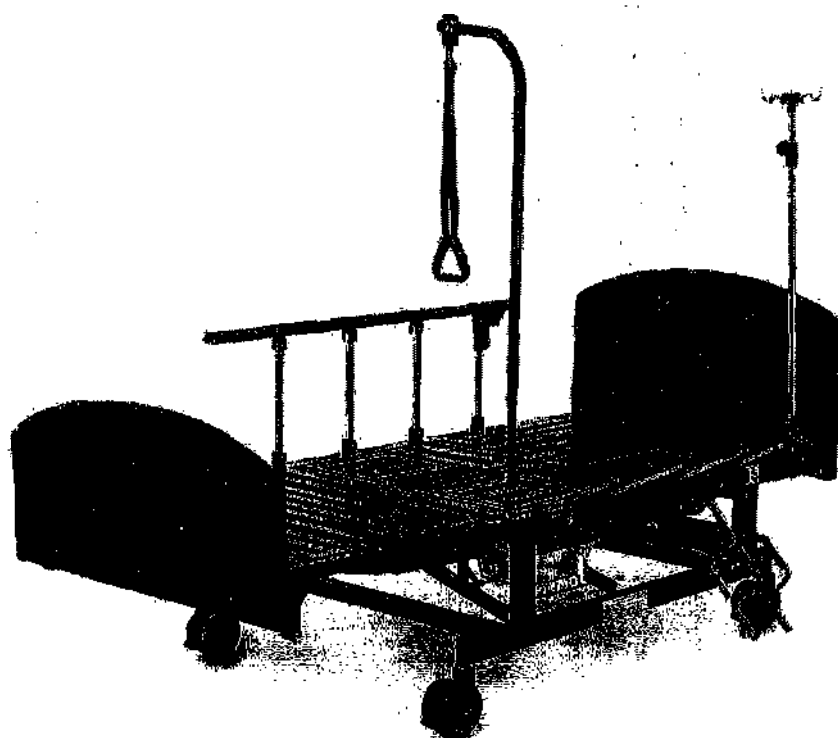


Тип 2

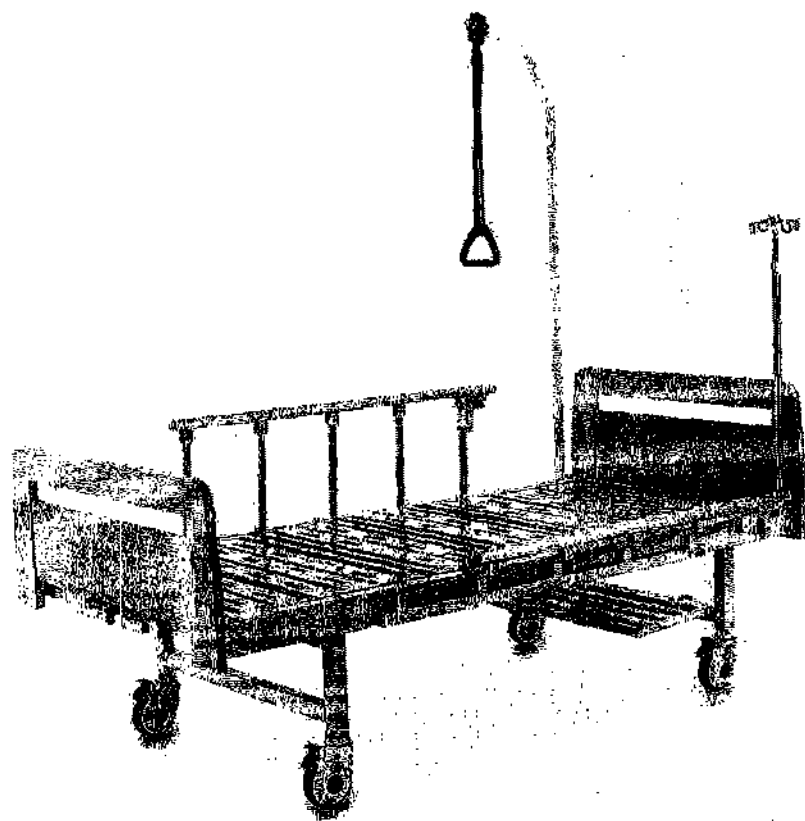


Тип 2.1

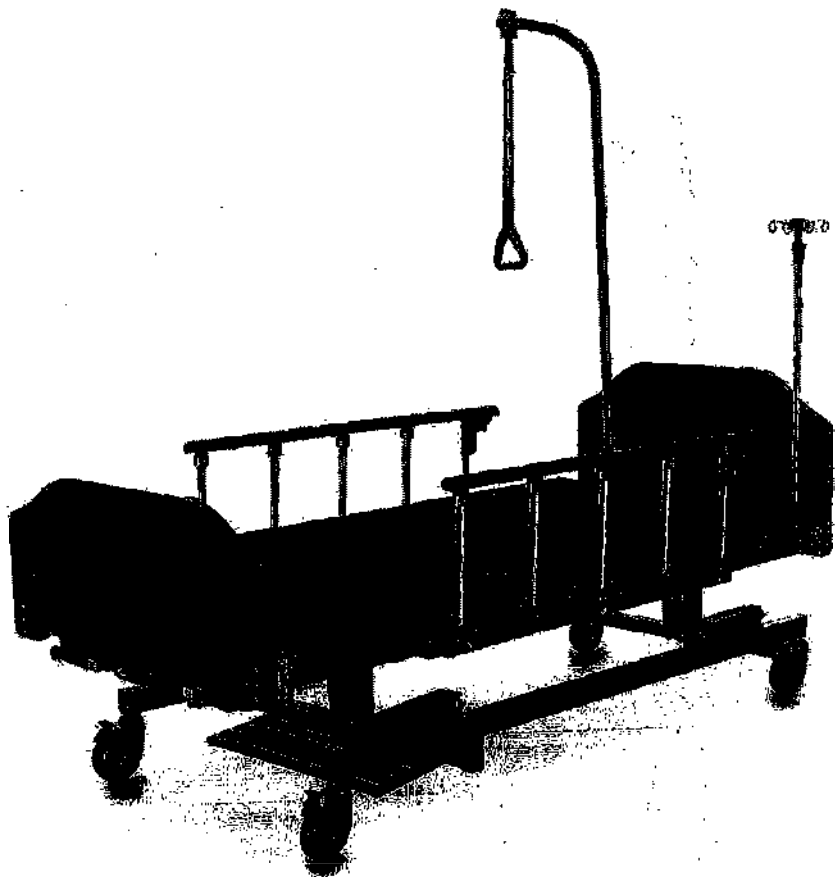


Тип 2.2

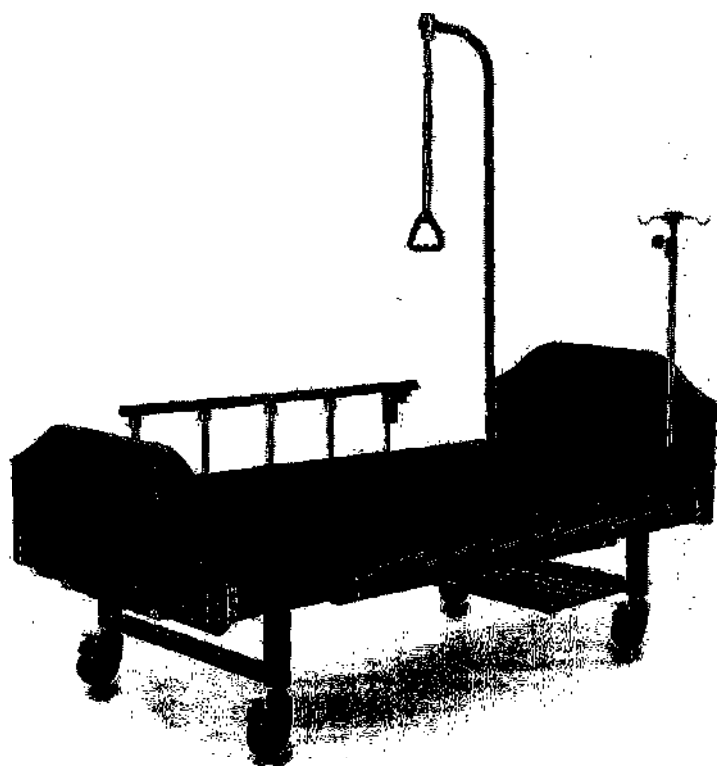


Тип 2.3

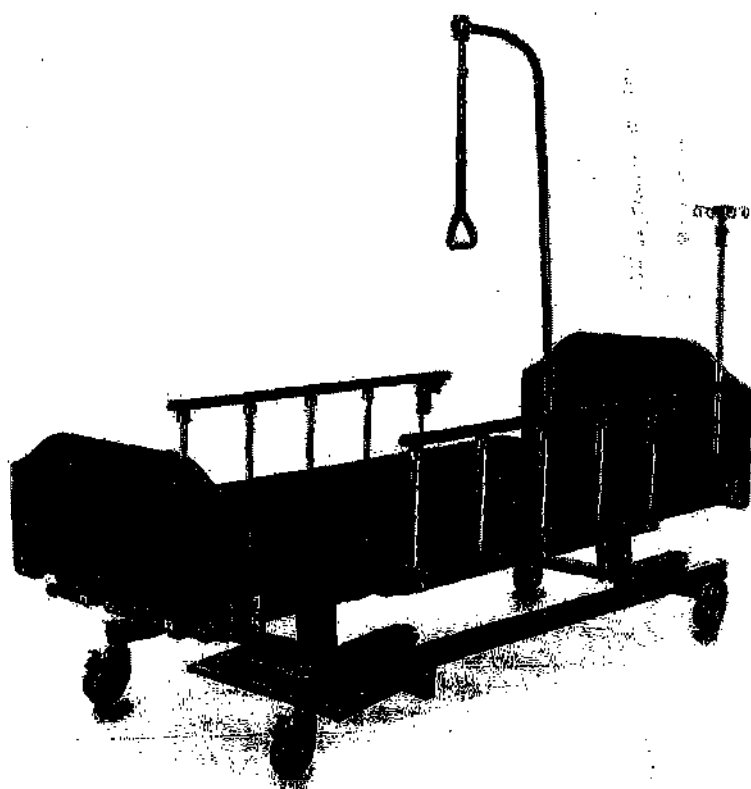


Тип 2.4

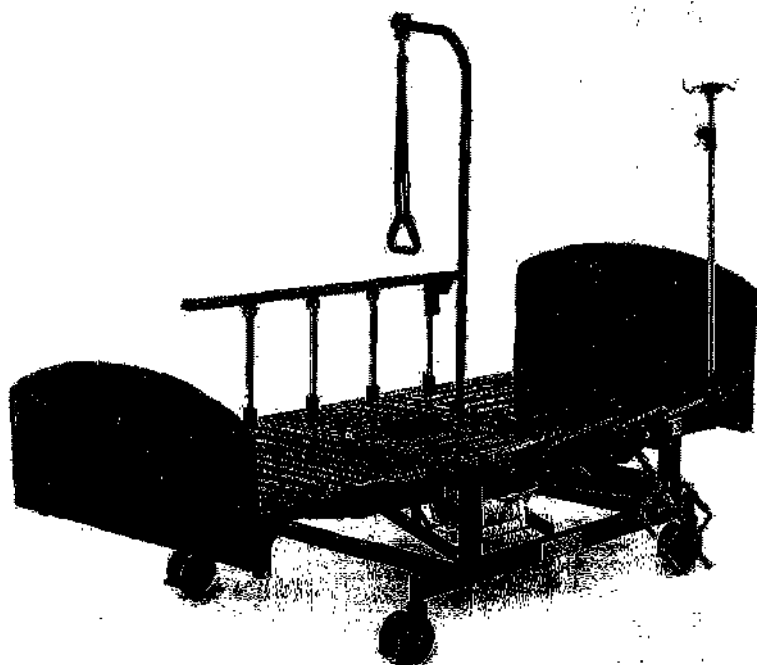


Тип 2.5

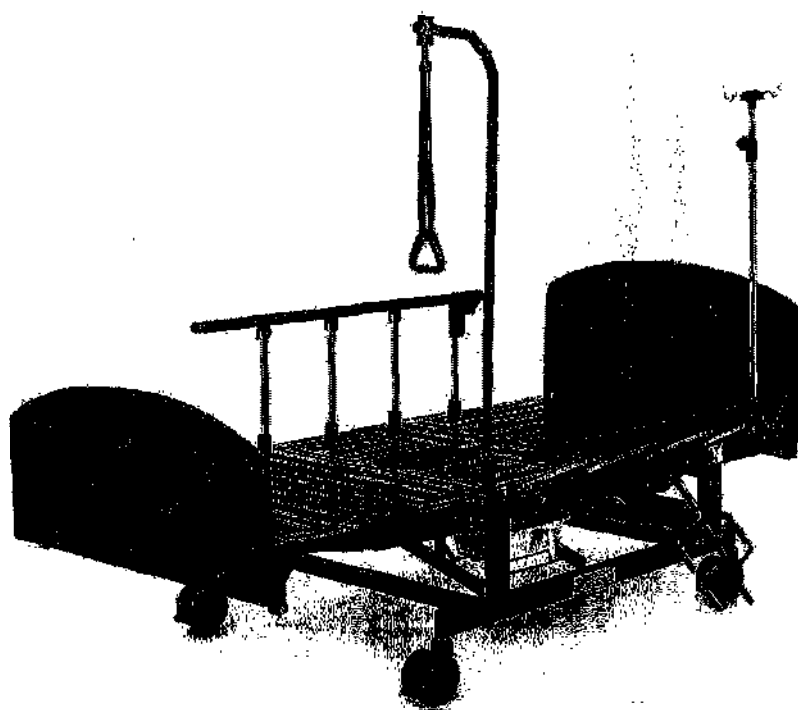

Тип 2.6

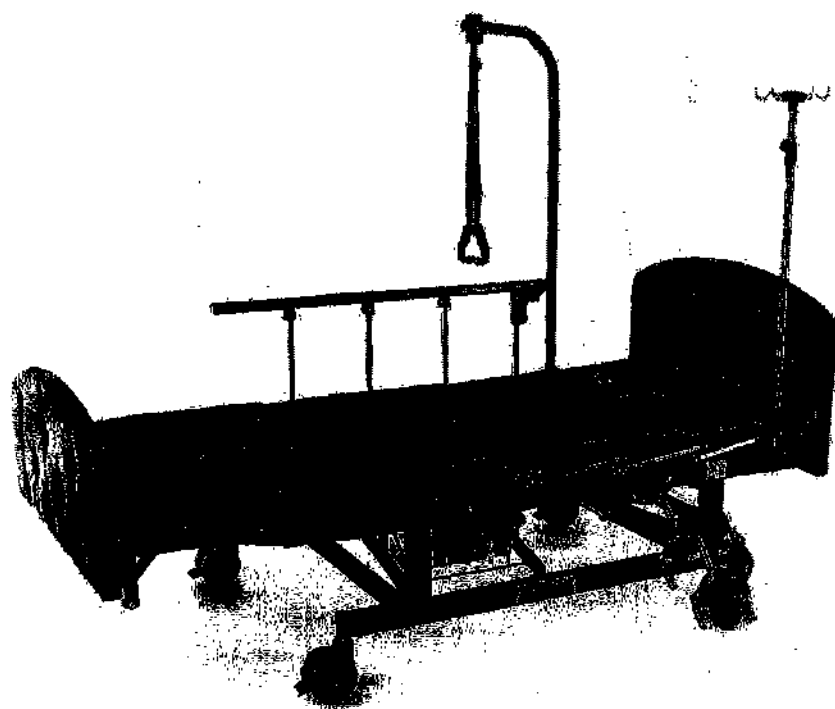


Тип 2.7

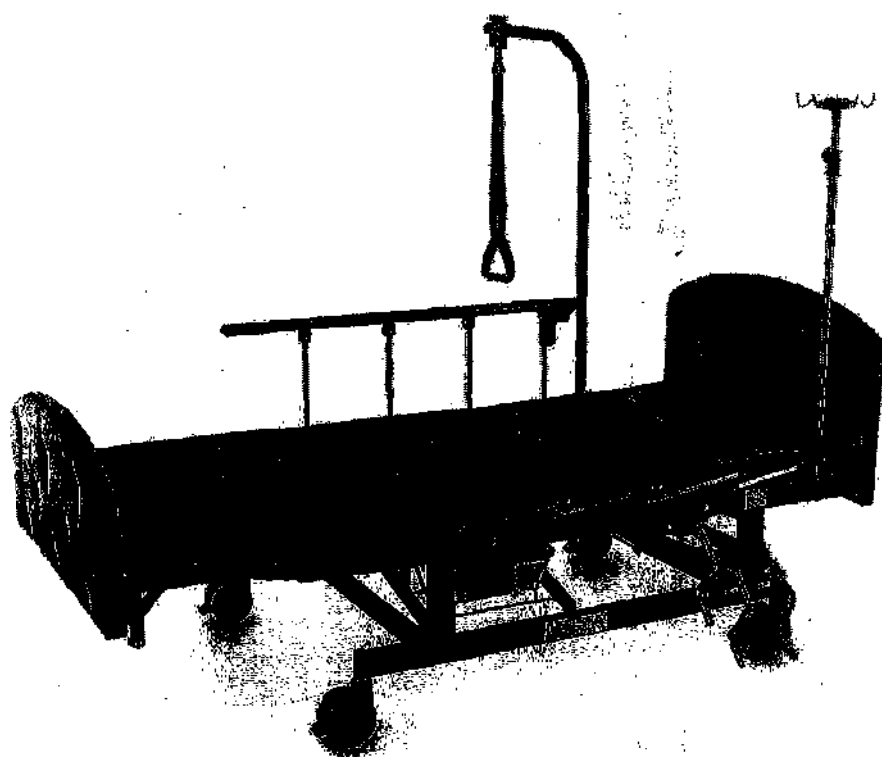


Тип 3




Тип 4

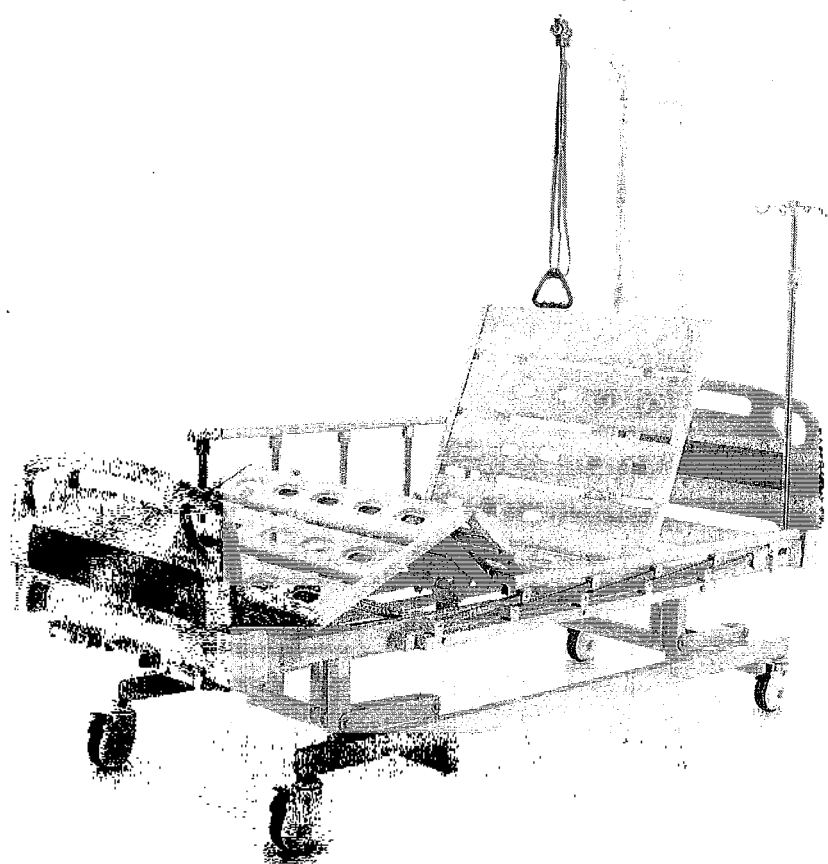


Тип 4.1

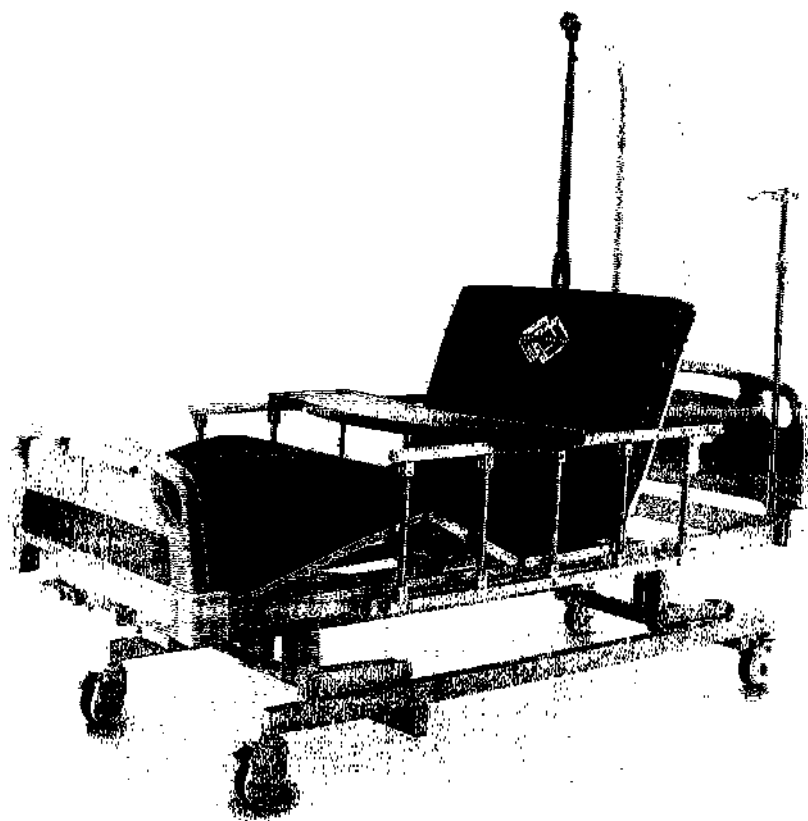


Тип 4.2

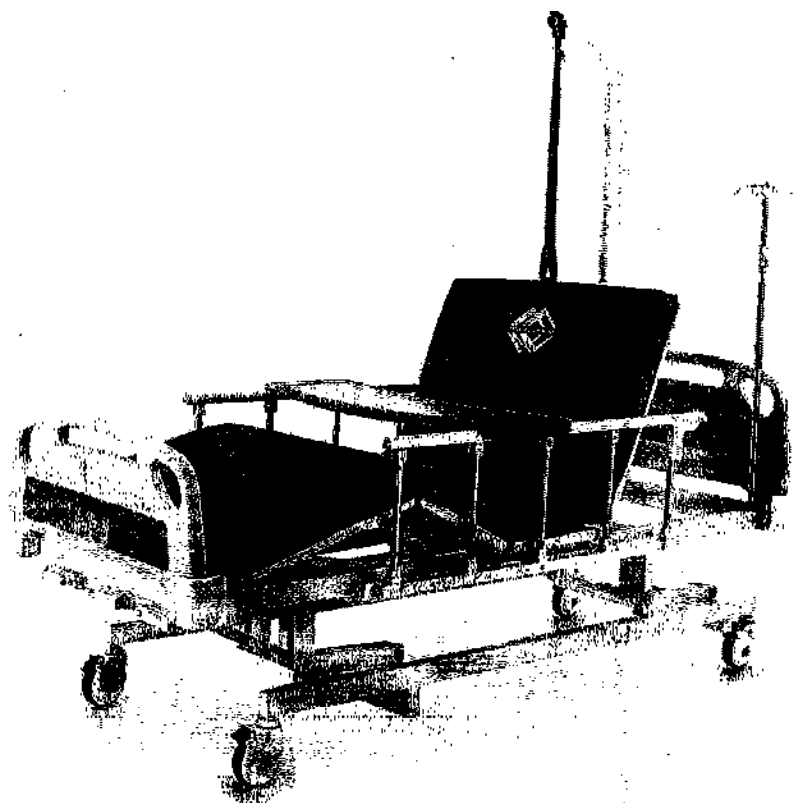


Тип 4.3

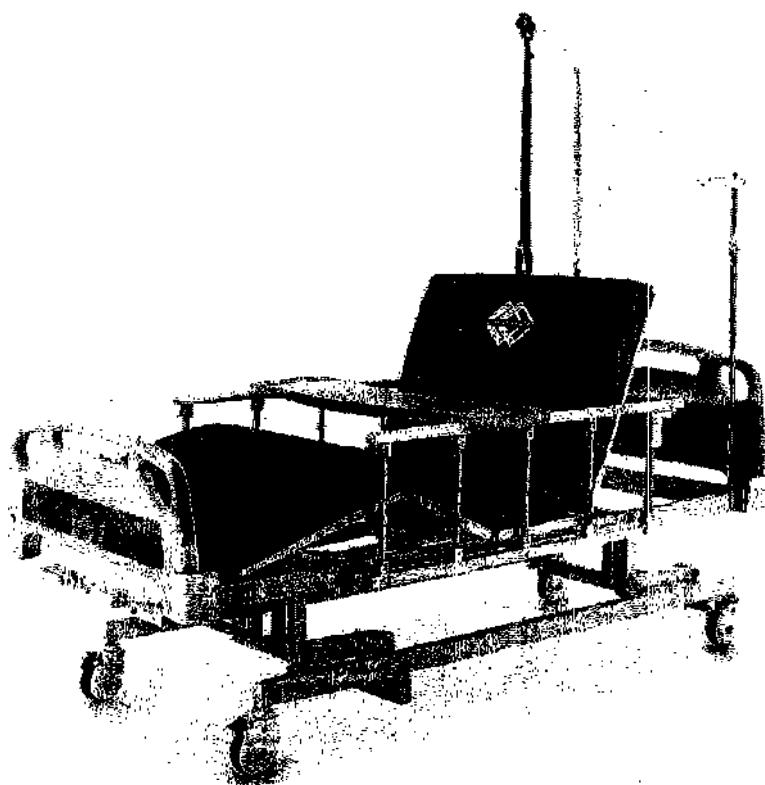


Тип 4.4

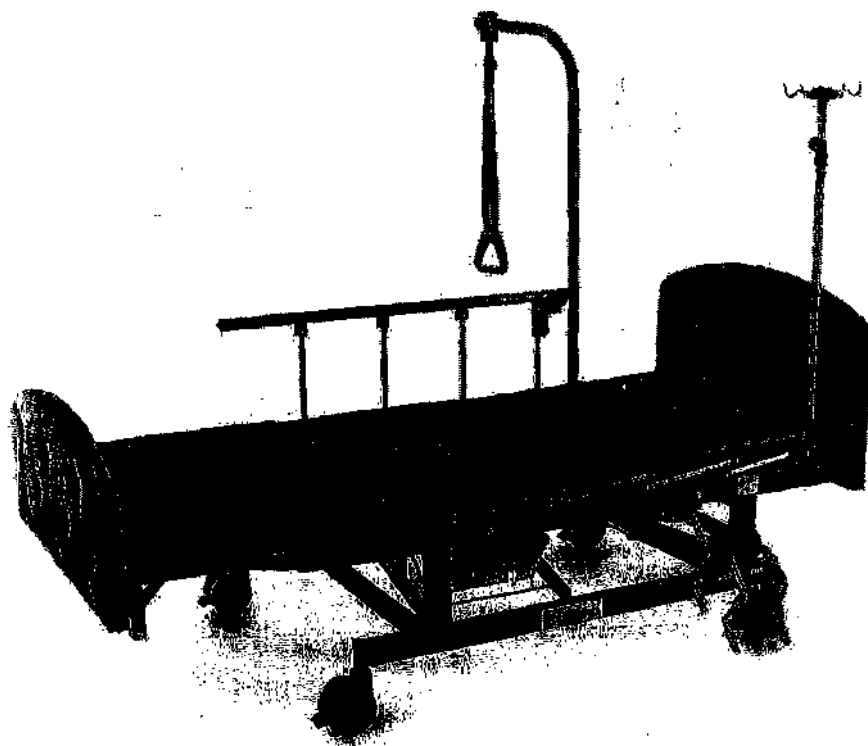


Тип 4.5

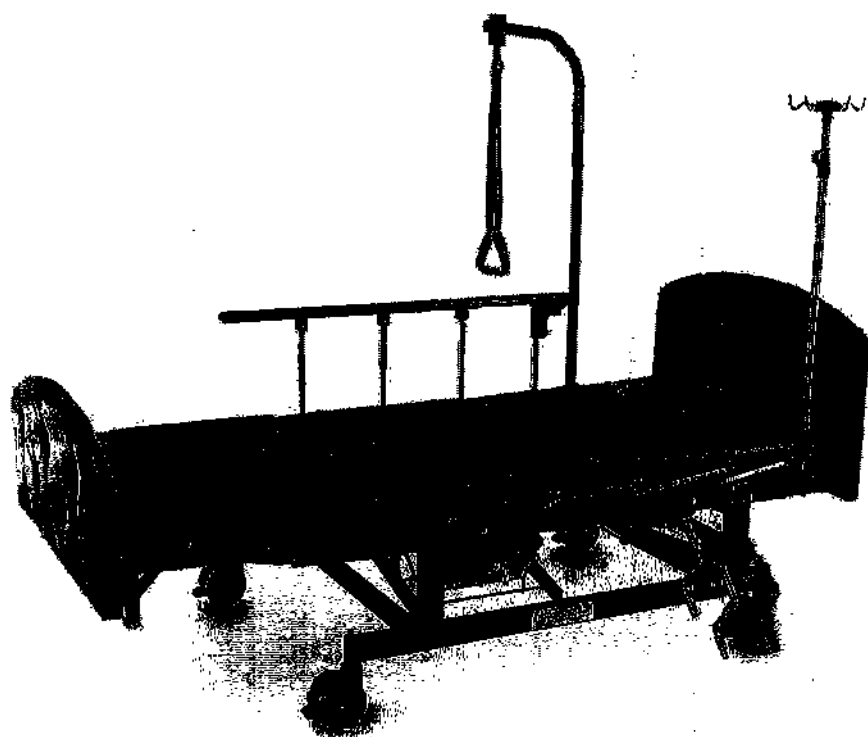


Тип 4.6

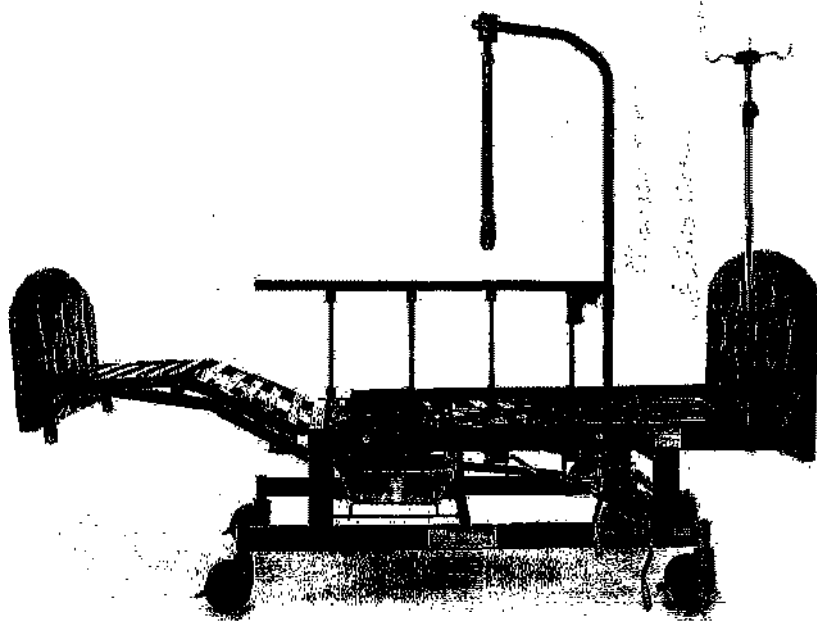


Тип 4.7

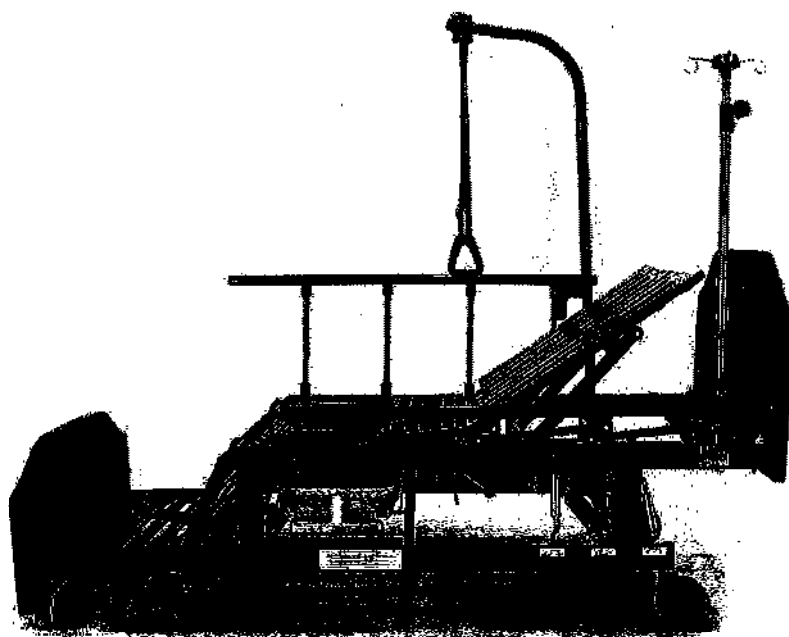


Тип 6

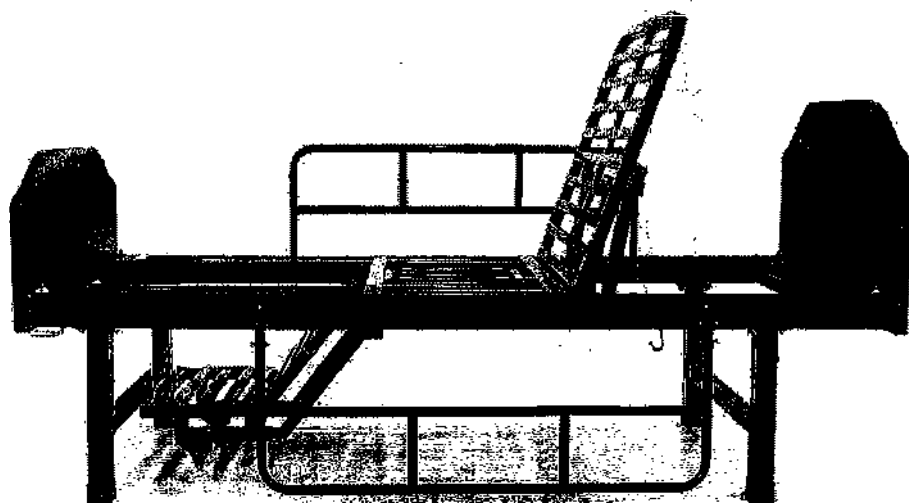


Тип 6.1

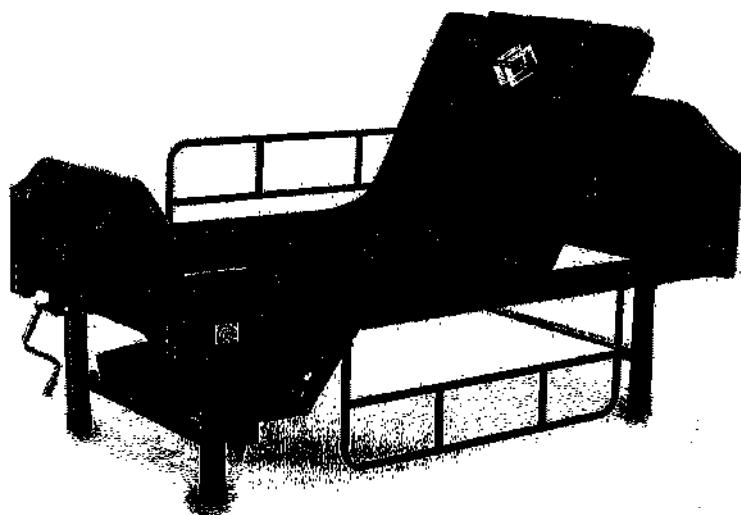


Тип 6.2

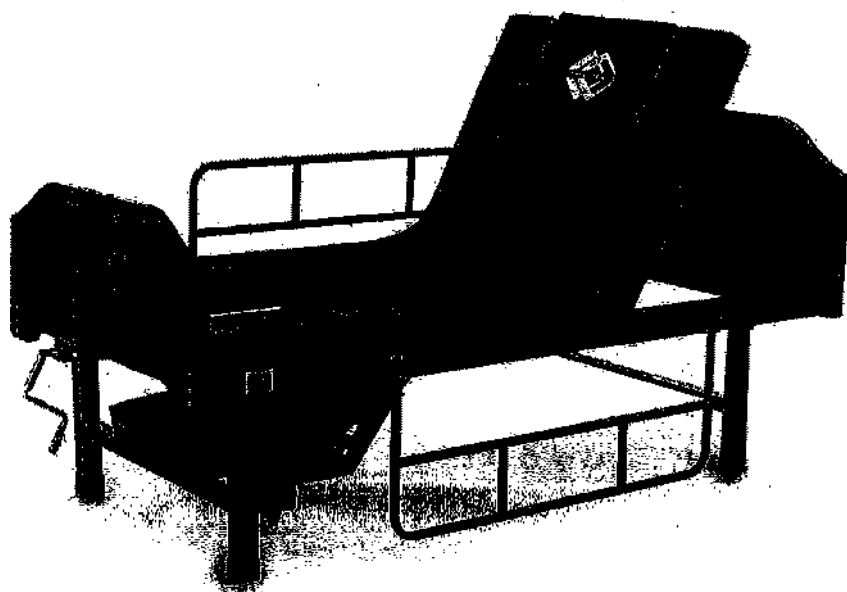


Тип 6.3

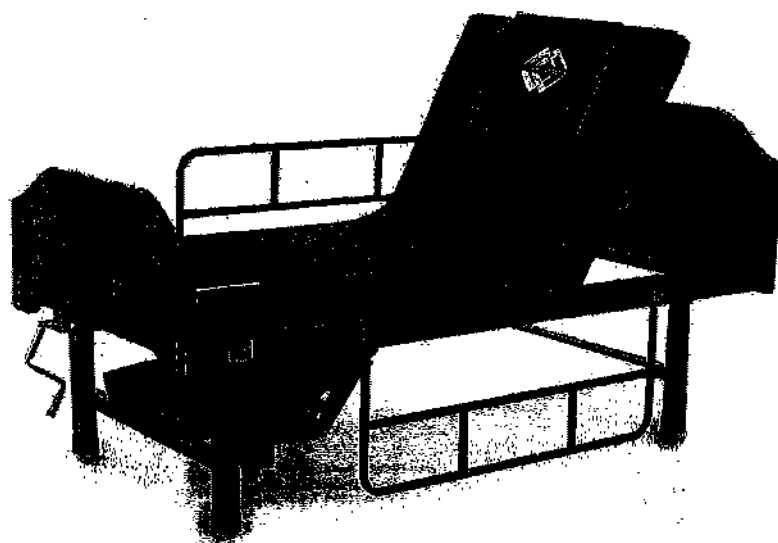


Тип 6.4

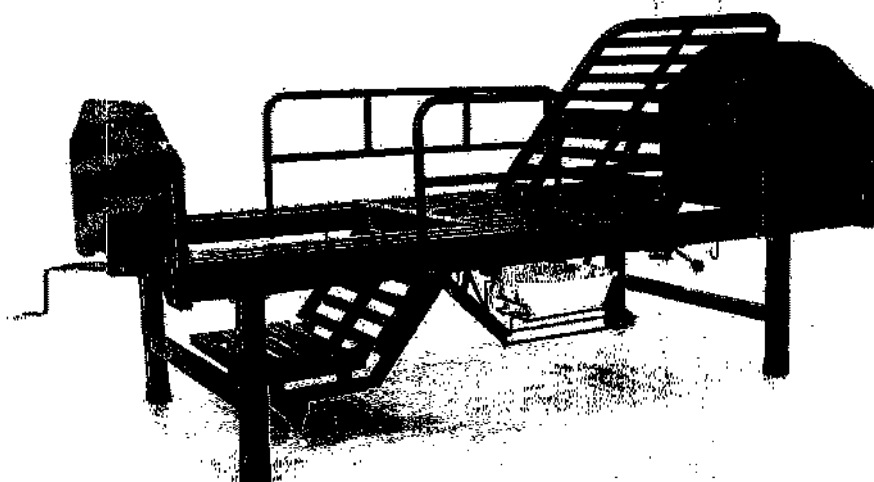


Тип 6.5

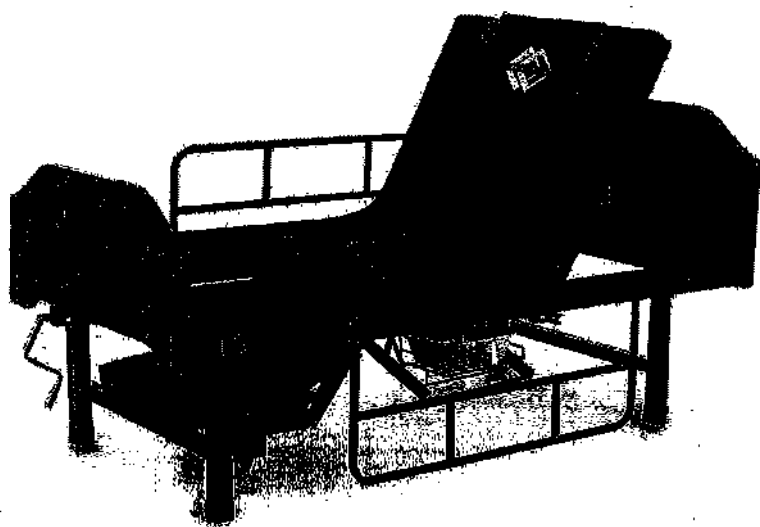


Тип 6.6

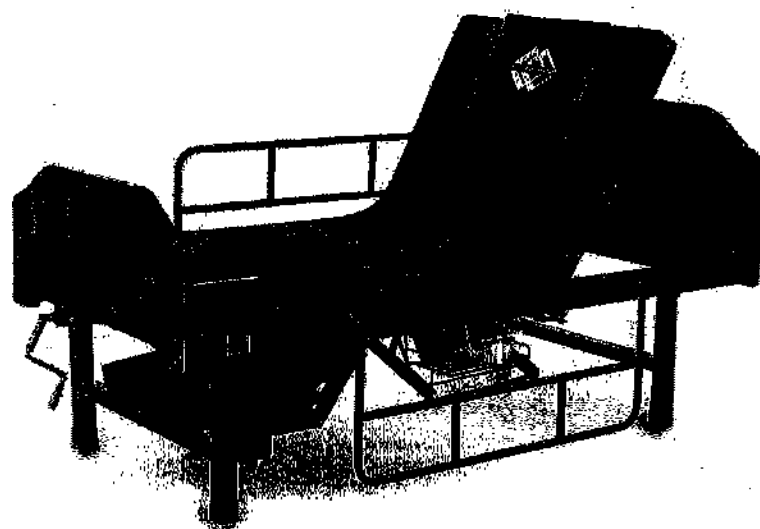


Тип 6.7

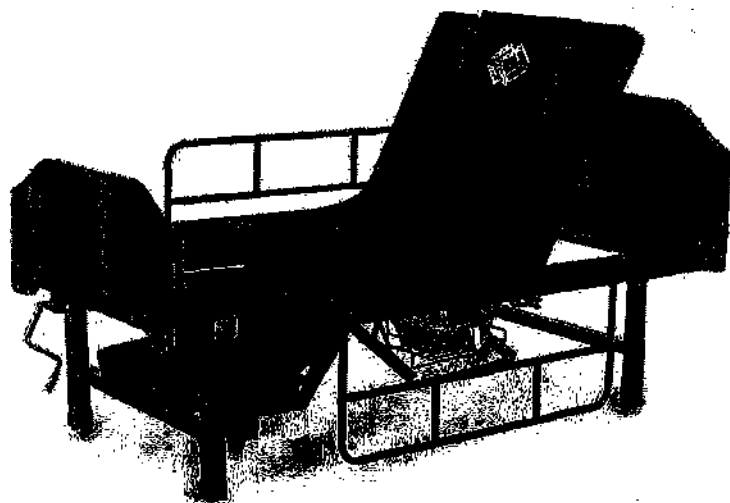


○ Тип 7

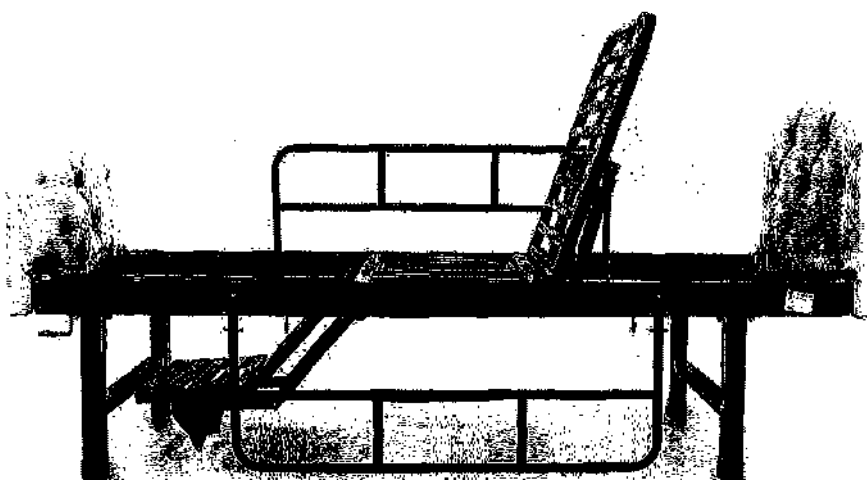


Тип 7.1

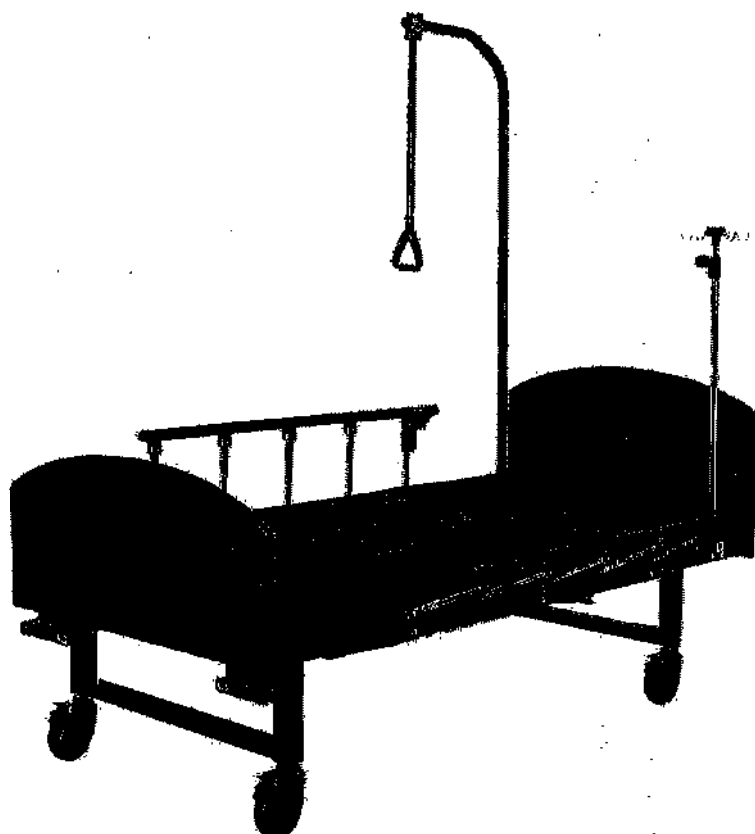


Тип 7.2

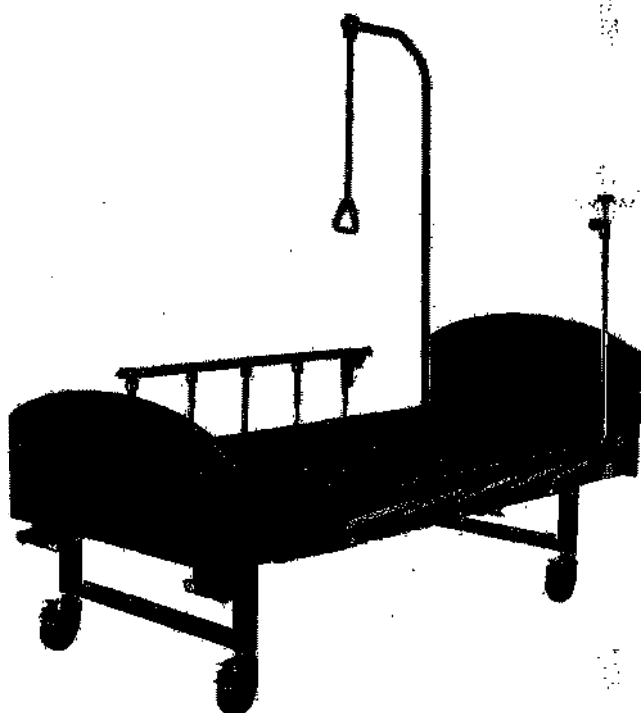


Тип 7.3

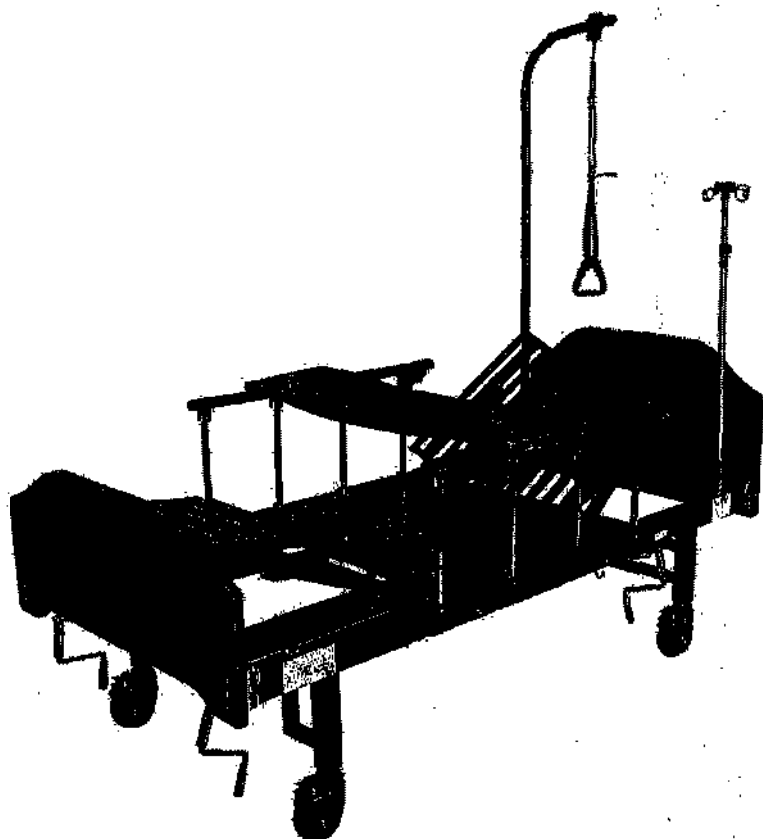


Тип 7.4

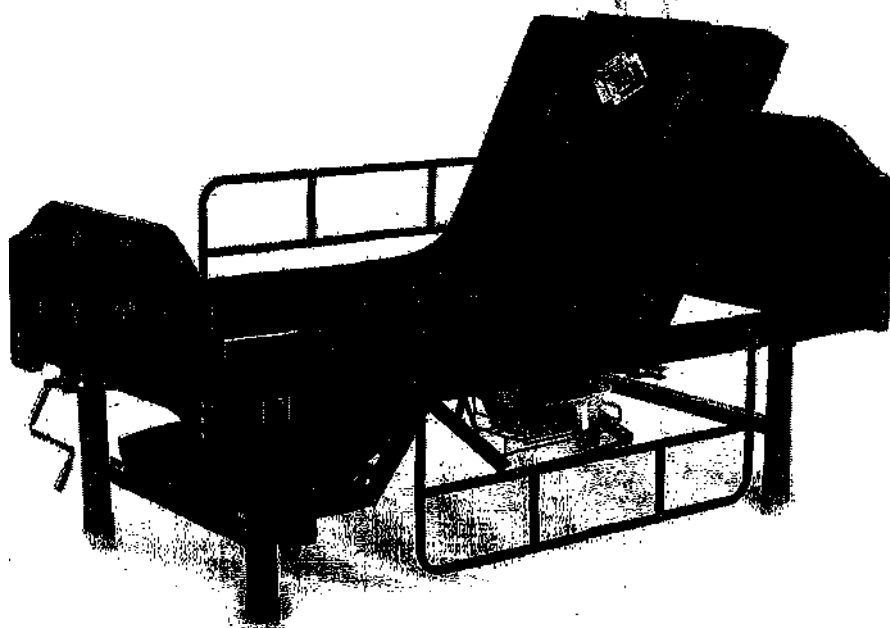


Тип 7.5

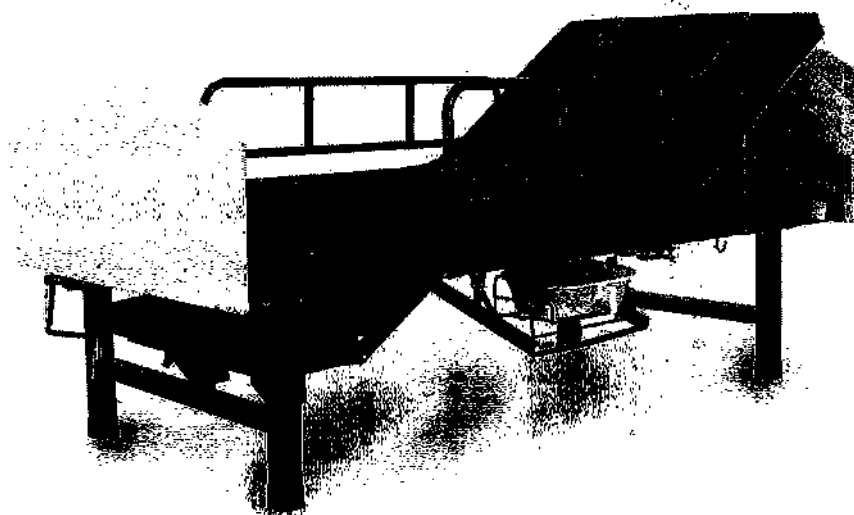

Тип 7.6

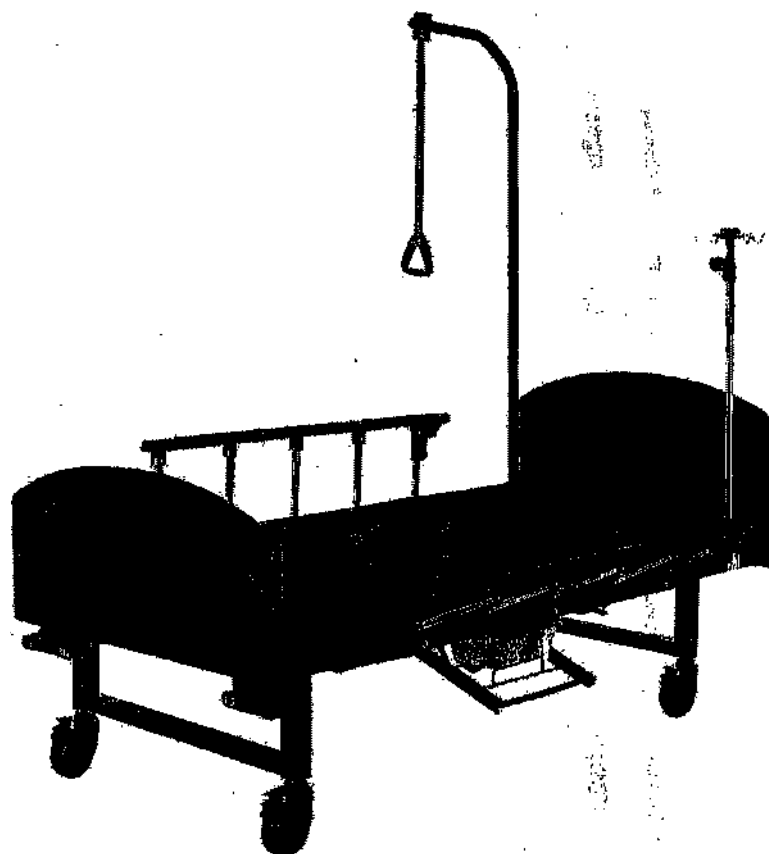

Тип 7.7

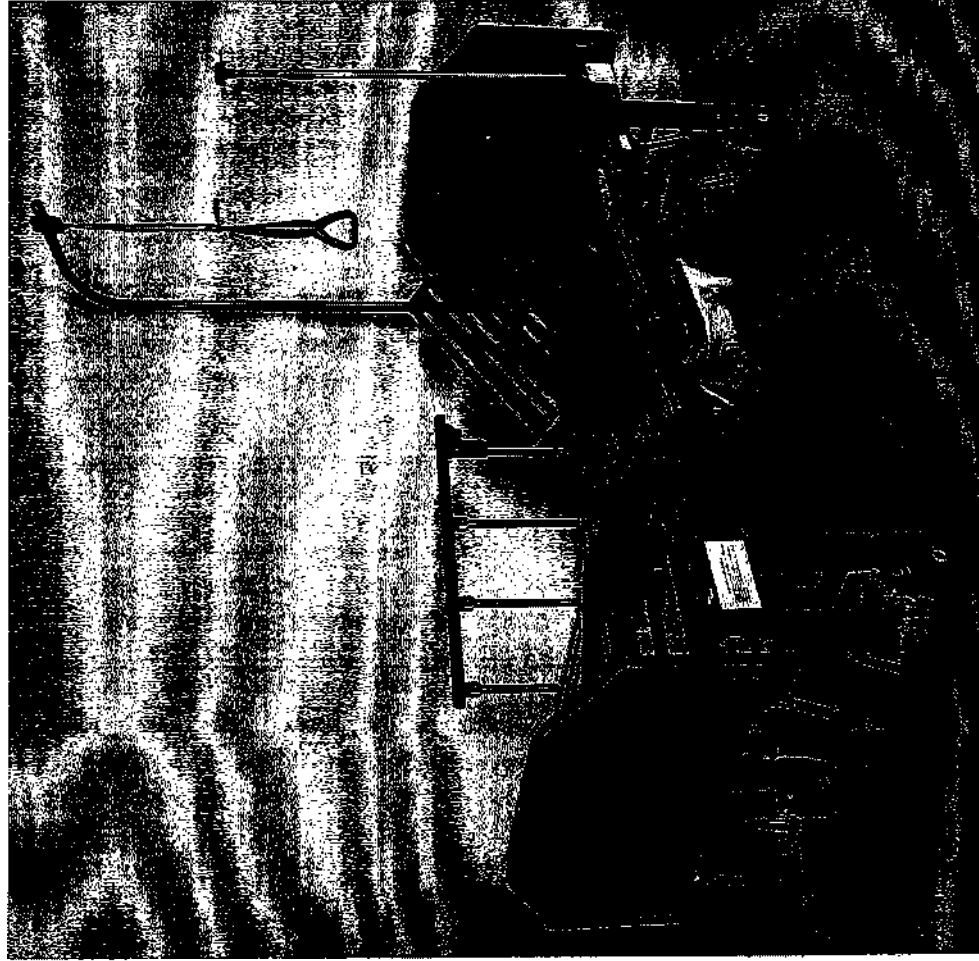

Характеристики изделий

Тип 1 (регулировка секции спины единой)+

Секция спины	Тазобедренная Секция

Кровать. Вид сбоку


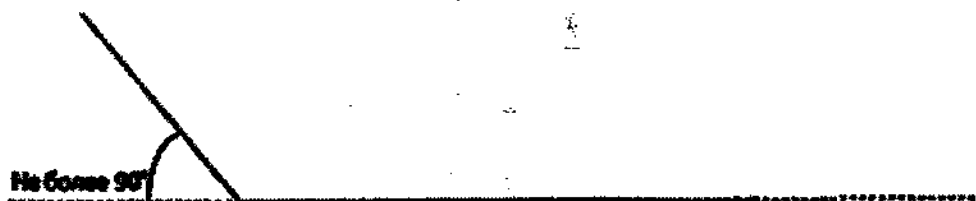


Таблица 1Б
Вариант 1.1

Параметр	значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина тазобедренной секции	не более 1400 мм
Ширина тазобедренной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм

Тип 1.2 (регулировка секции спины единой)+ секция туалетного выреза+

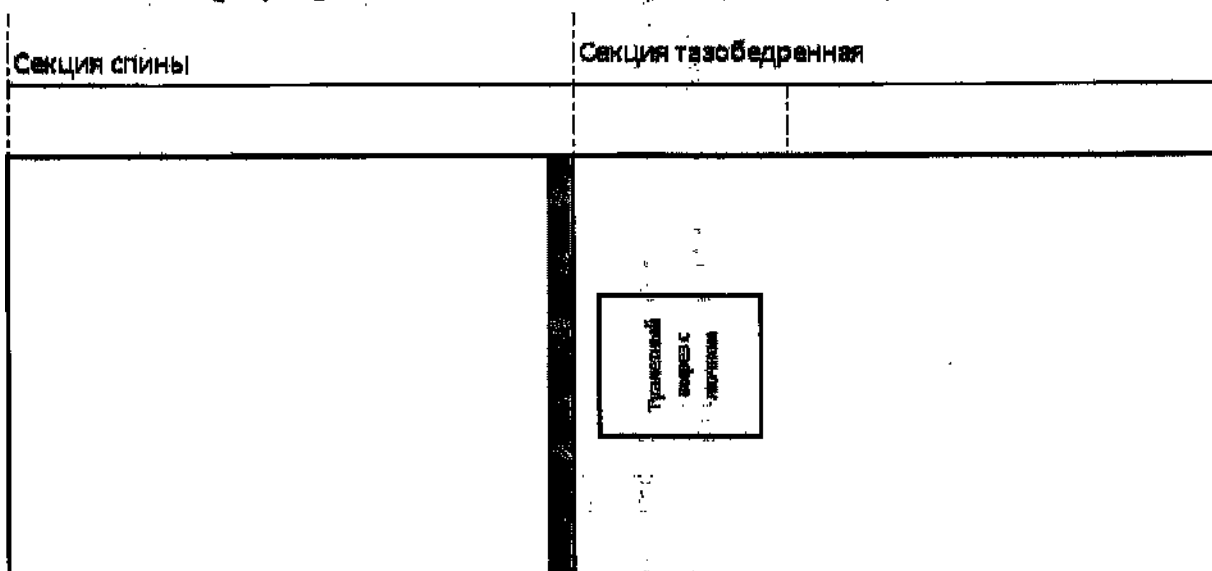

Кровать. Вид сбоку

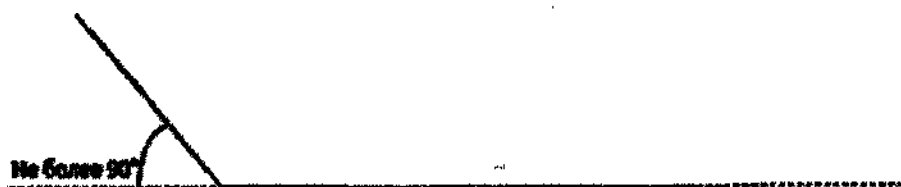


Таблица 2Б
Вариант 1.2.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина тазобедренной секции	не более 1400 мм
Ширина тазобедренной секции	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Длина регулирующей секции	не более 900 мм
Ширина регулирующей секции	не более 1400 мм
Длина регулирующей секции	не более 900 мм

Тип 2 (регулировка секции спины единой и ножной единой секции)

Секция спины	Секция таза	Ножная единая секция

Кровать. Вид сбоку




Таблица 3Б
Вариант 2.1

Параметр	значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина ножной секции	не более 900 мм
Ширина ножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки Секции спины	механическая
Тип регулировки Ножной секции	механическая
Кол-во механических приводов безвозв.ком. привода	2 шт.

Тип 2.1 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной единой секции) + боковое переворачивание

	Секция спины	Секция таза	Ножная секция
Боковое переворачивание			

Кровать. Вид со стороны

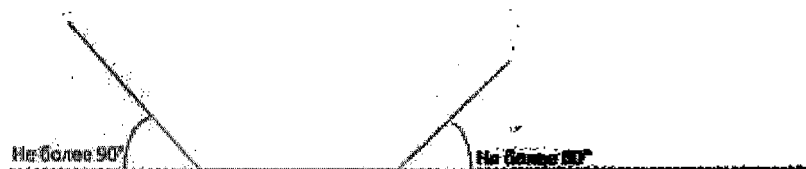

Секция спины (вид спереди)



Таблица 4Б
Вариант 2.1.1

Параметр	значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина ножной секции	не более 900 мм
Ширина ножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	
Ширина секции бокового переворачивания левая	
Длина секции бокового переворачивания правая	
Ширина секции бокового переворачивания правая	

Тип 2.2 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной единой секции) + поддержка секции спины

Секция спины	Секция таза	Ножная секция
Боковая поддержка секции спины		
Боковая поддержка секции спины		

Кровать. Вид сбоку




Секция спины (вид спереди)



Параметр	значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина центральной секции спины	не более 900 мм
Ширина центральной секции спины	не более 800 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина ножной секции	не более 900 мм
Ширина ножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Материал обивки секции спинной	механический
Материал обивки секции таза	механический

Тип 2.4 (регулировка секции спины единой и ножной единой секции)+ секция туалетного выреза

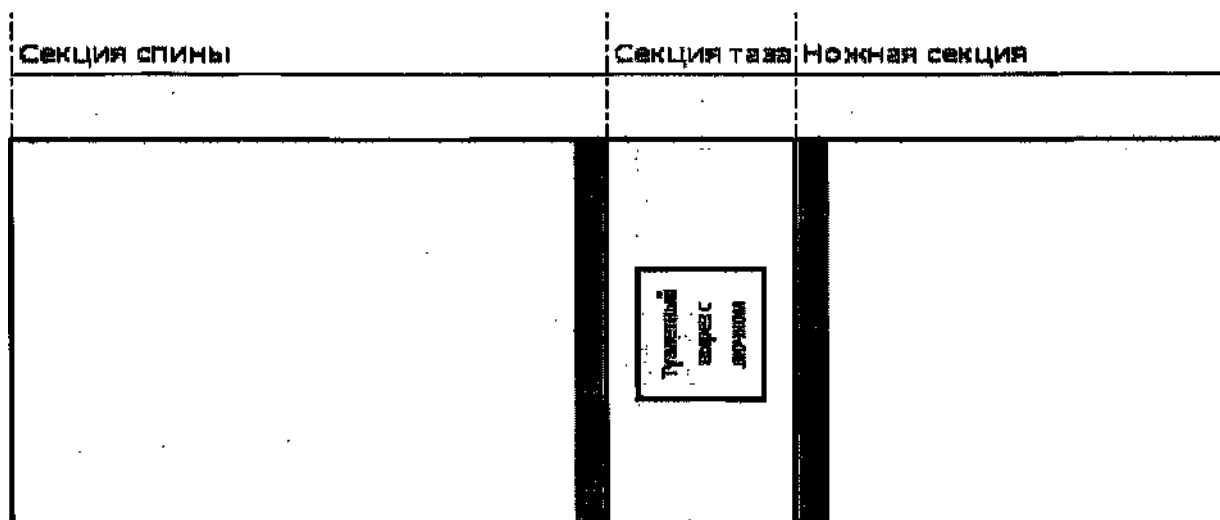

Кровать. Вид сбоку



Таблица 7Б
Вариант 2.4.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина ножной секции	не более 900 мм
Ширина ножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Длина регулировки секции спины	не более 900 мм
Длина регулировки секции таза	не более 600 мм
Длина регулировки секции ножной	не более 900 мм
Количество секций регулировки	не более 3

Тип 2.5 спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной единой секции) + боковое переворачивание + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция
	Секция туалетного выреза	

Кровать, вид сверху



Секция спины (вид спереди)

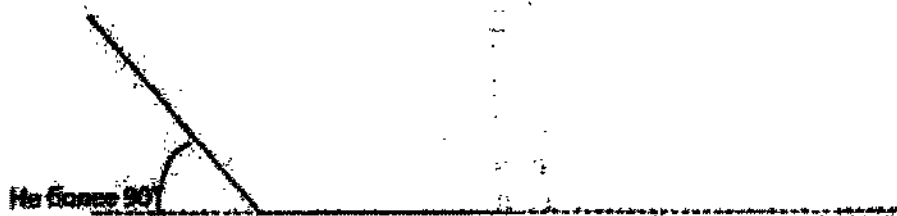


Таблица 8Б
Вариант 2.5.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм

Тип 2.6 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной единой секции) + поддержка секции спины + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция
Боковая поддержка секции спины Боковая поддержка секции спины	Секция туалетного выреза	

Кровать. Вид сбоку



Секция спины (вид спереди)



Таблица 9Б
Вариант 2.6.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина центральной секции спины	не более 900 мм
Ширина центральной секции спины	не более 800 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм

Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина ножной секции	не более 900 мм
Ширина ножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Механизм подъема кровати	механический
Механизм фиксации кровати	механический
Механизм фиксации кровати	автоматический
Механизм фиксации кровати	механический
Механизм фиксации кровати	механический

Тип 2.7 (регулируемая спинная секция (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной единой секции) + боковое переворачивание + поддержка секции спины + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция
Боковая поддержка секции спины	Секция туалетного выреза	
Боковая поддержка секции спины		

Кровать. Вид сбоку



Секция спины (вид спереди)



Таблица 10Б
Вариант 2.7.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм

Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина ножной секции	не более 900 мм
Ширина ножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина ножной секции	не более 900 мм
Ширина ножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм

Тип 3 (без регулировки)

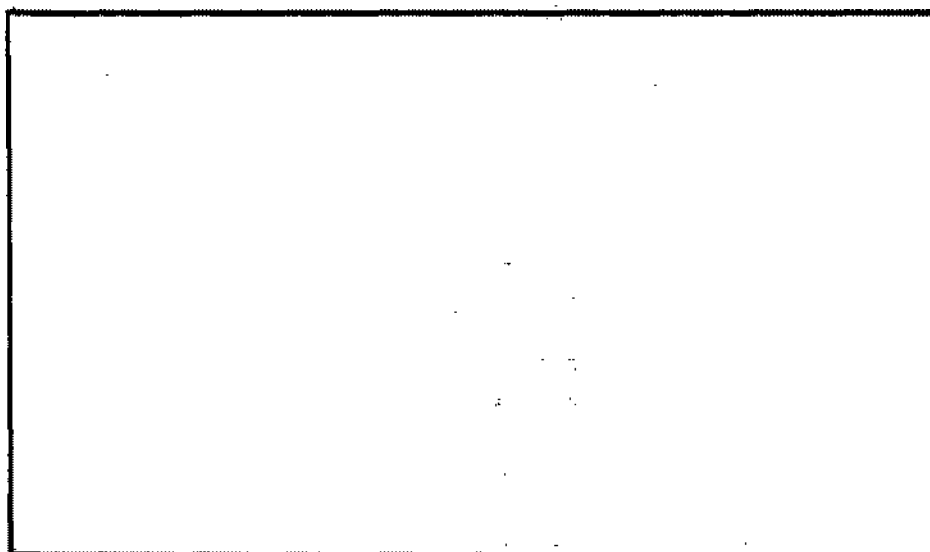


Таблица 11Б
Вариант 3.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина подвижной ножной секции левой	не более 900 мм
Ширина подвижной ножной секции левой	не более 700 мм
Длина подвижной ножной секции правой	не более 900 мм
Ширина подвижной ножной секции правой	не более 700 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Количество механизмов привода в базовой комплектации	0 шт.

Тип 4 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную))

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Секция бедер	Икроножная секция

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

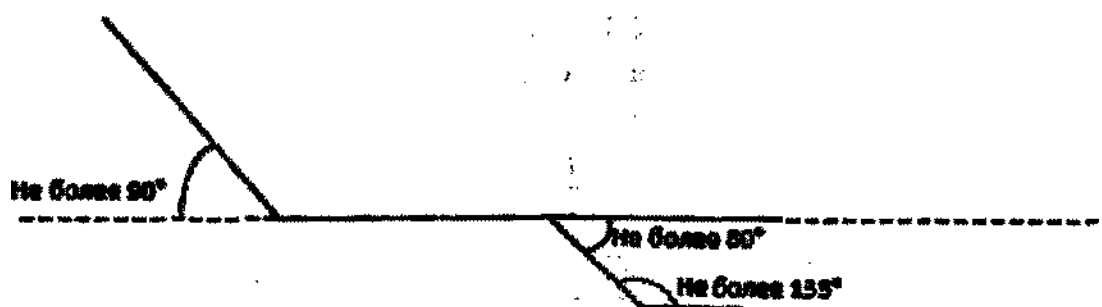


Таблица 19Б
Вариант 4.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм

Длина секции бедер	не более 500 мм
Ширина секции бедер	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки секции бедер	механическая
Тип регулировки секции бедер	механическая
Тип регулировки икроножной секции	электромотор
Максимальная нагрузка на основную конструкцию	220 кг
Расстояние	11 мм

Тип 4.1 (регулировка секции спины и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + боковое переворачивание

	Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
			Секция бедер	Икроножная секция
Боковое переворачивание				

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)



Секция спины (вид спереди)



**Таблица 20Б
Вариант 4.1.1**

Параметр	Значение
----------	----------


Тип 4.2 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + поддержка секции спины

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Секция бедер	Икроножная секция
Боковая поддержка секции спины Боковая поддержка секции спины			

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

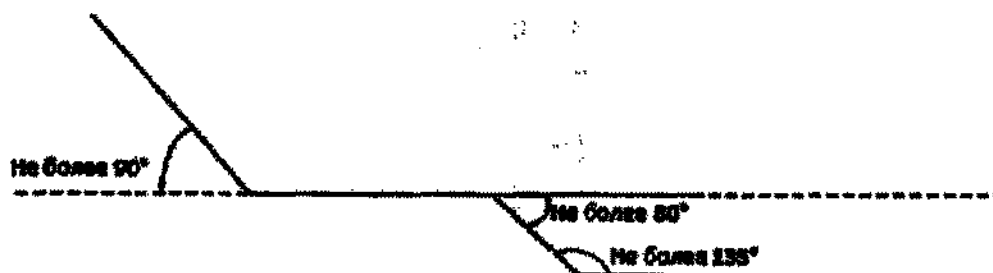

Секция спины (вид спереди)



Таблица 21Б
Вариант 4.2.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина центральной секции спины	не более 900 мм
Ширина центральной секции спины	не более 800 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции бедер	не более 500 мм
Ширина секции бедер	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм


Тип 4.3 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + боковое переворачивание + поддержка секции спины

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Секция бедер	Икроножная секция
Боковая поддержка секции спины			
Боковая поддержка секции спины			

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

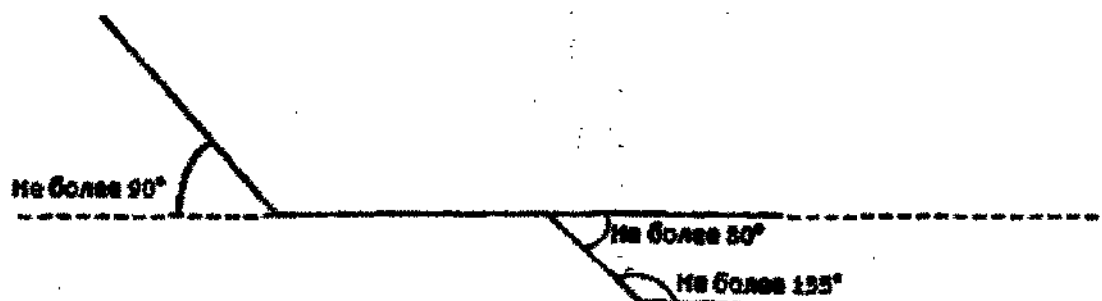

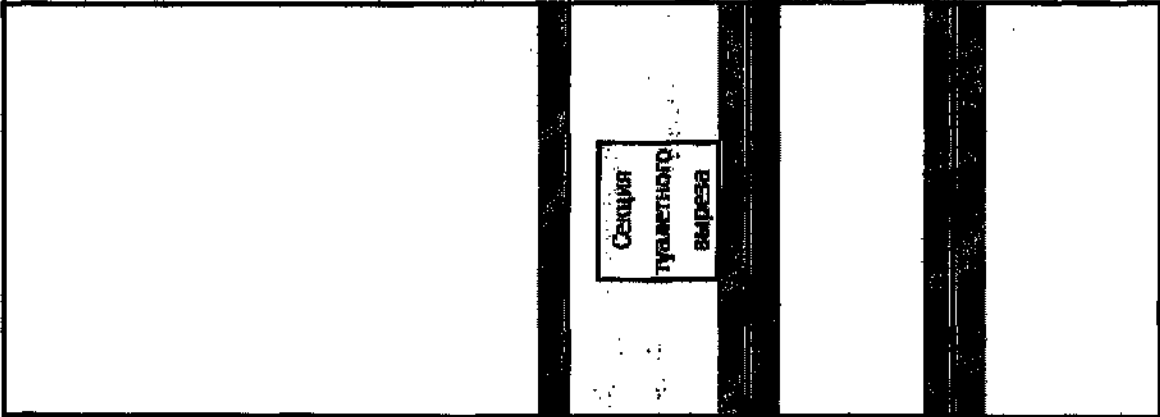
Секция спины (вид спереди)



Таблица 22Б
Вариант 4.3.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции бедер	не более 500 мм
Ширина секции бедер	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Длина секции боковой поддержки таза	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки таза	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки бедер	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки бедер	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки икроножной секции	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки икроножной секции	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки стопы	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки стопы	не более 200 мм

Тип 4.4 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную)) + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Секция бедер	Икроножная секция
			

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

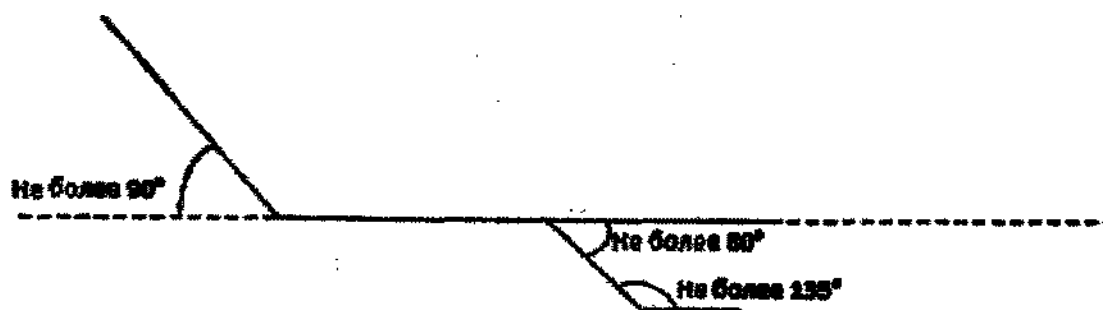


Таблица 23Б
Вариант 4.4.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм

Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции бедер	не более 500 мм
Ширина секции бедер	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки спинной секции	механическая
Тип регулировки секции бедер	механическая
Тип регулировки икроножной секции	механическая
Тип регулировки секции туалетного выреза	механическая
Колесный механизм секции таза и выкатной секции икроножной секции	да
Регулировка	да

Секция спины (вид спереди)

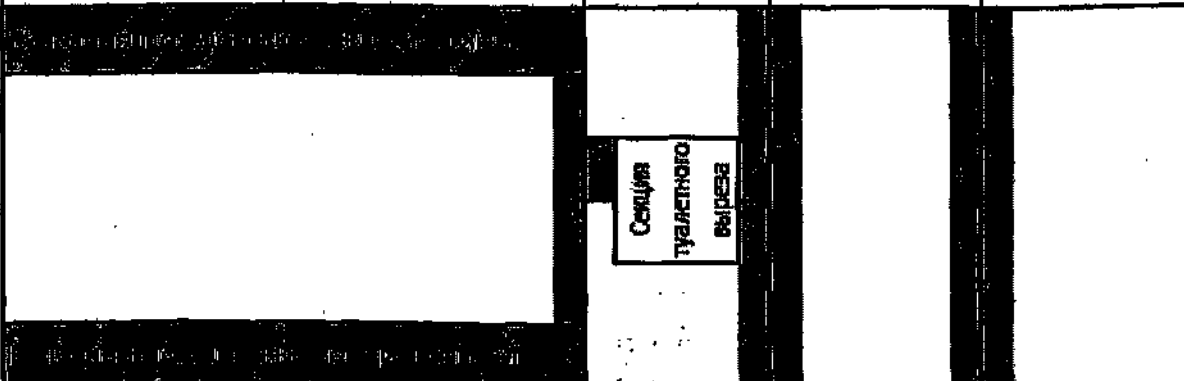


Таблица 24Б

Вариант 4.5.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции бедер	не более 500 мм
Ширина секции бедер	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции бедер	не более 500 мм
Ширина секции бедер	не более 1400 мм
Длина икроножной секции	не более 750 мм
Ширина икроножной секции	не более 1400 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм

Тип 4.6 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на секцию бедер и икроножную))+поддержка секции спины+секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Секция бедер	Икроножная секция
			

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)




Тип 4.7 ((регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции(разделение на секцию бедер и икроножную)) +боковое переворачивание +поддержка секции спины+секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Секция бедер	Икроножная секция
Боковая поддержка секции спины	Секция туалетного выреза		
Боковая поддержка секции спины			

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

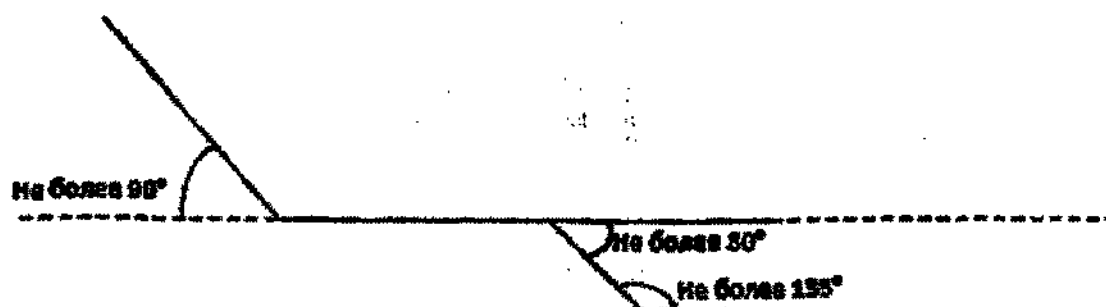

Тип 6 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции))

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная секция
		Ножная секция неподвижная	
		на более 30°	на более 30°
		Ножная секция неподвижная	

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

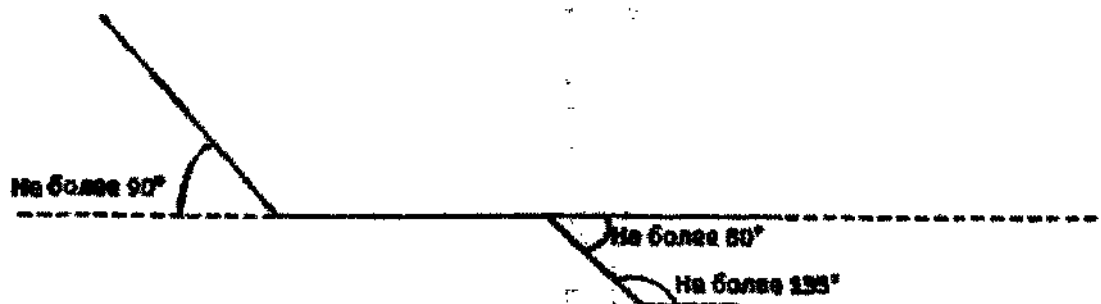


Таблица 35Б
Вариант 6.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм

Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки Секция спины	механическая
Тип регулировки Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки Икроножно-опорная	растопыт
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	2 шт.
Растопыт	1 шт.


Тип 6.1 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции (разделение на ножную, ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + боковое переворачивание

	Секция спины	Секция тазов	Ножная секция	
			Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная секция (2)
Боковое переворачивание			Ножная секция неподвижная	
			1	2
			Ножная секция неподвижная	

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

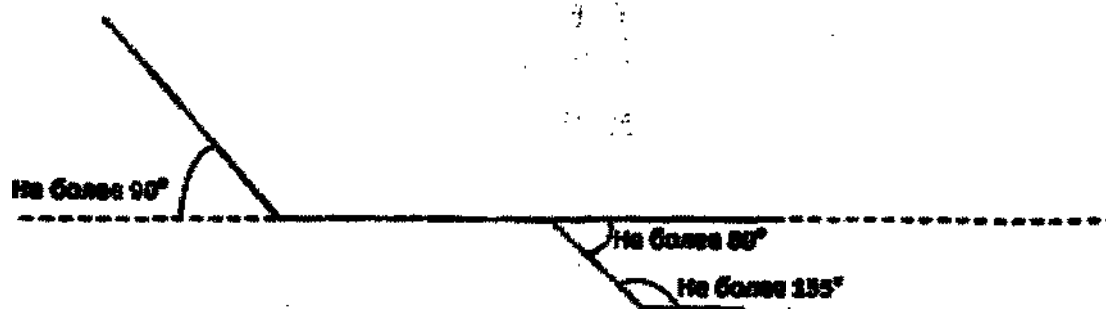

Секция спины (вид спереди)



Таблица 36Б
Вариант 6.1.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки Секция спины	механическая
Тип регулировки Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки Икроножно-опорная	растопы
Тип регулировки Боковое переворачивание	механическая
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	3 шт
Растопы	1 шт
Тип регулировки Секция спины	механическая
Тип регулировки Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки Икроножно-опорная	растопы


Тип 6.2 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножную неподвижную секцию, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + без бокового переворачивания + поддержка секции спины

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная
Боковая поддержка секции спины  Боковая поддержка секции спины		Ножная секция неподвижная	
		1	2
		Ножная секция неподвижная	

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

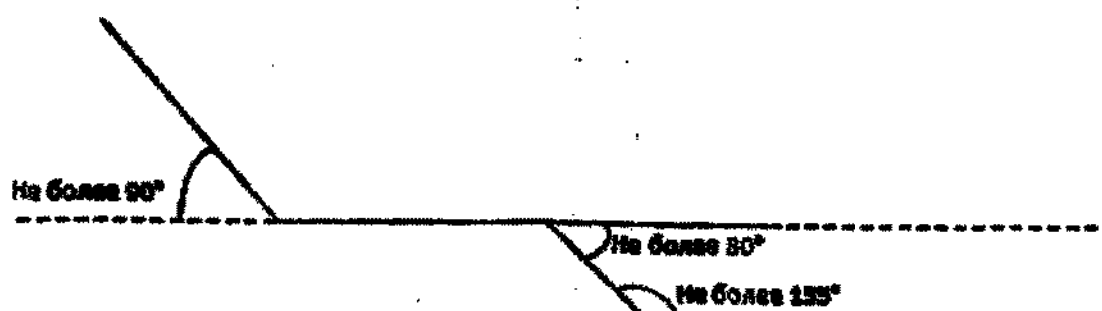

Секция спины (вид спереди)



Таблица 37Б
Вариант 6.2.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина центральной секции спины	не более 900 мм
Ширина центральной секции спины	не более 800 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции бедренно-икротно-опорной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икротно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина икротно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икротно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки Секция спины	Механическая
Тип регулировки Бедренно-икротно-опорная секция	Механическая
Тип регулировки Икротно-опорная	Растомат
Тип регулировки Боковая поддержка секции спины	Автоматическая
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	2 шт.
Растомат	1 шт.


**Тип 6.3 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции(разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции))
+ боковое переворачивание + поддержка секции спины**

Секция спины	Секция тазов	Ножная секция	
		Бедренно-икроножная секция	Икроножно-опорная
Боковая поддержка секции спины	Не более 50°	Ножная секция неподвижная	
Боковая поддержка секции спины	Не более 50°	Ножная секция неподвижная	

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

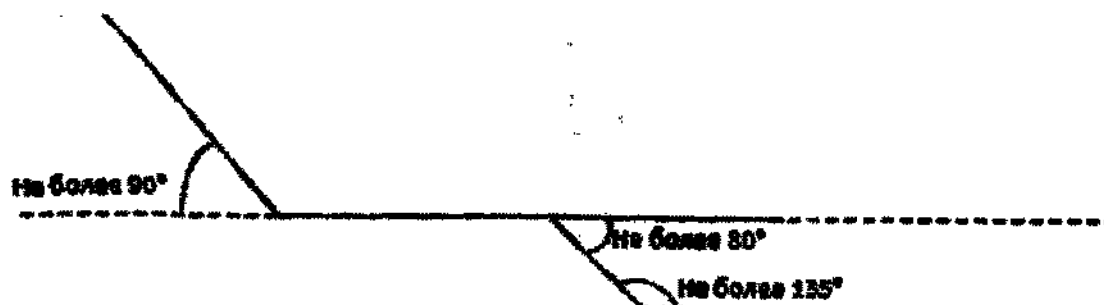

Секция спины (вид спереди)



Таблица 38Б
Вариант 6.3.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки Секция спины	механическая
Тип регулировки Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки Икроножно-опорная	раздат
Тип регулировки Боковое переворачивание	механическая
Тип регулировки Боковая поддержка секции спины	автоматическая
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	3 шт.
Растромат	1 шт.

Тип 6.4 (регулировка секции спины единой и ножной секции(разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная
	Секция туалетного выреза	Ножная секция неподвижная	
		1	2
		Ножная секция неподвижная	

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

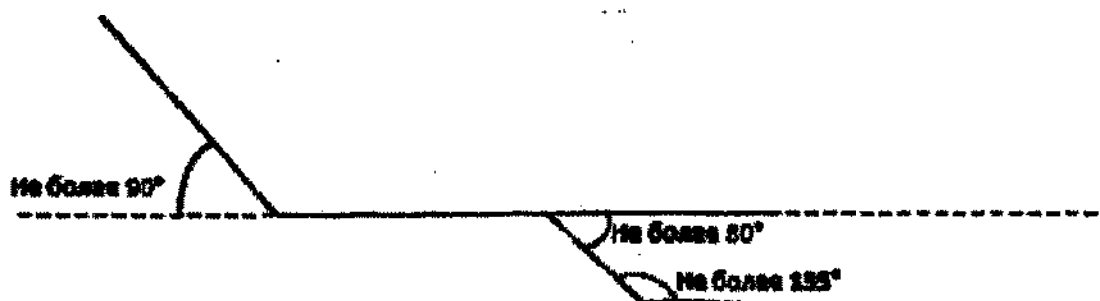


Таблица 39Б
Вариант 6.4.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм

Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции бедренно-икротно-опорной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икротно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина икротно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икротно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки: Секция спины	механическая
Тип регулировки: Бедренно-икротно-опорная секция	механическая*
Тип регулировки: Икротно-опорная	Растомат
Тип регулировки: Секция туалетного выреза	механическая
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	не более 2 шт.*
Растомат	Гидр.
*Функция регулировки бедренно-икротно-опорной и икротно-опорной секций может осуществляться с помощью единого привода секции спины	


Тип 6.5 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции(ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + боковое переворачивание + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция тазов	Ножная секция	
		Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная секция
		Ножная секция неподвижная	
	Секция туалетного выреза		
		Ножная секция неподвижная	

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

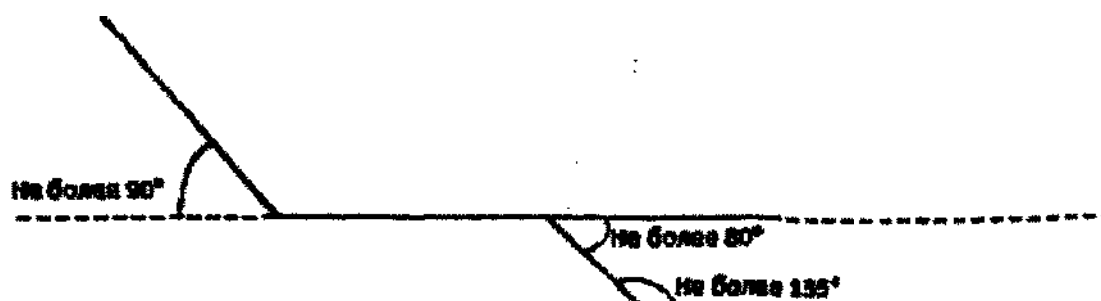

Секция спины (вид спереди)



Таблица 40Б
Вариант 6.5.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции бедренно-икруножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икруножной секции	не более 1100 мм
Длина икруножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икруножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки Секция спины	механическая
Тип регулировки Бедренно-икруножная секция	механическая
Тип регулировки Икруножно-опорная	растomat
Тип регулировки Боковое переворачивание	механическая
Тип регулировки Секция туалетного выреза	мех. рычаг
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	3 шт
Растomat	да/нет

Тип 6.6 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + поддержка секции спины + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таз	Ножная секция	
		Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная
		Ножная секция неподвижная	
	Секция туалетного выреза		
		Ножная секция неподвижная	

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)



Секция спины (вид спереди)



Таблица 41Б
Вариант 6.6.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина центральной секции спины	не более 900 мм
Ширина центральной секции спины	не более 800 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки: Секция спины	механическая
Тип регулировки: Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки: Икроножно-опорная	растomat
Тип регулировки: Боковая поддержка секции спины	автоматическая
Тип регулировки: Секция туалетного выреза	мех. рычаг
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	3 шт.
Растомат	1 шт.


Тип 6.7 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + боковое переворачивание + поддержка секции сины + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная
Боковая поддержка секции (спинной)		Ножная секция неподвижная	
	Секция туалетного выреза	Не более 80°	Не более 80°
Боковая поддержка секции (спинной)		Ножная секция неподвижная	

Кровать (вид сбоку). Вариант 1



Кровать (вид сбоку). Вариант 2 (опционально)

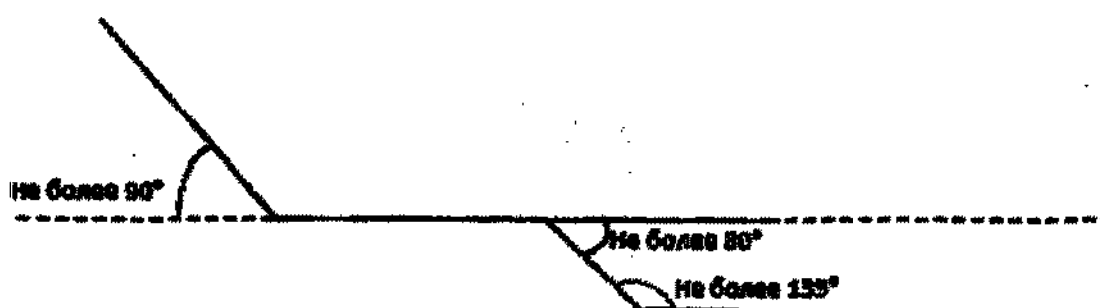

Секция спины (вид спереди)



Таблица 42Б
Вариант 6.7.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки Секция спины	механическая
Тип регулировки Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки Икроножно-опорная	растопмат
Тип регулировки Боковое переворачивание	механическая
Тип регулировки Боковая поддержка секций спины	автоматическая
Тип регулировки Секция туалетного выреза	механическая
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	3 шт
Растопмат	1 шт
Тип регулировки Секция таза	механическая

Тип 7 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза

Секция спины	Секция таза		Ножная секция	
	Секция анатомической	Секция	Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная секция
	Не более 25°		Ножная секция неподвижная	
			Ножная секция неподвижная	

Кровать. Вид сбоку (вариант поднятия ножной секции)



Кровать. Вид сбоку (вариант опускания ножной секции)



**Таблица 43Б
Вариант 7.1**


Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции анатомической поддержки таза	не более 300 мм
Ширина секции анатомической поддержки таза	не более 600 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм

Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки: Секция голыш	механическая
Тип регулировки: Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки: Икроножно-опорная секция	Растомат
Тип регулировки: Анатомическая поддержка секции таз	автоматическая
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	2 шт.
Растомат	1 шт.


Тип 7.1 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание

	Секция спины	Секция таза		Ножная секция	
		Анатомическая поддержка таза	Анатомическая поддержка таза	Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная секция (2)
Боковое переворачивание			Не более 25°		
					Ножная секция неподвижная
					Ножная секция неподвижная

Кровать. Вид сбоку (вариант поднятия ножной секции вверх)

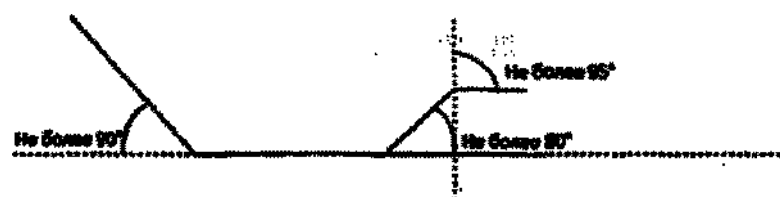

Кровать. Вид сбоку (вариант опускания ножной секции вниз)

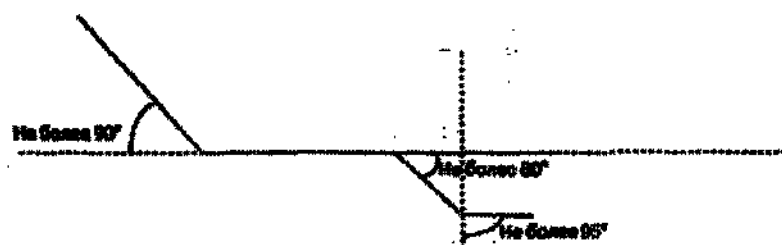

Секция спины (вид спереди)

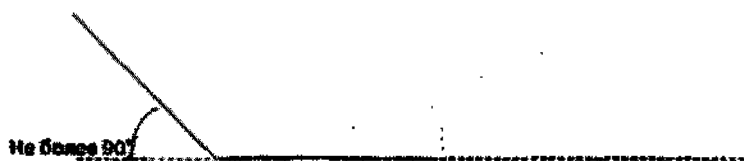


Таблица 44Б
Вариант 7.1.1


Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм

Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции анатомической поддержки таза	не более 300 мм
Ширина секции анатомической поддержки таза	не более 600 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки: Секция спины	механическая
Тип регулировки: Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки: Икроножно-опорная секция	расومات
Тип регулировки: Боковое переворачивание секция	механическая
Тип регулировки: Анатомическая поддержка секции таза	автоматическая
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	3 шт
Расومات	1 шт


Тип 7.2 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножную неподвижную секцию, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + поддержка секции спины

Секция спины	Секция таз а	Ножная секция	
	Автоматическая поддержка секции таз а	Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная
Боковая поддержка секции спины	Не более 25°	Ножная секция неподвижная	
		1	2
Боковая поддержка секции спины		Ножная секция неподвижная	

Кровать: Вид сбоку (вариант поднятия ножной секции вверх)

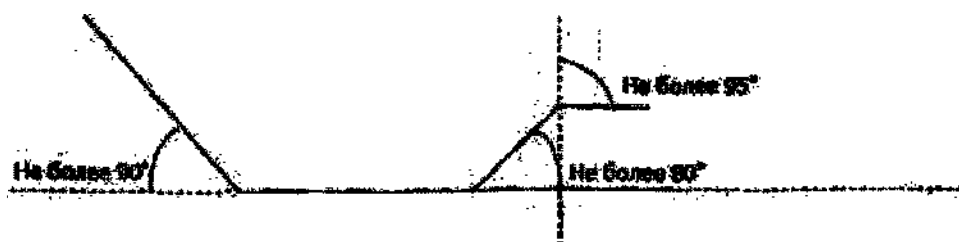

Кровать: Вид сбоку (вариант опускания ножной секции вниз)

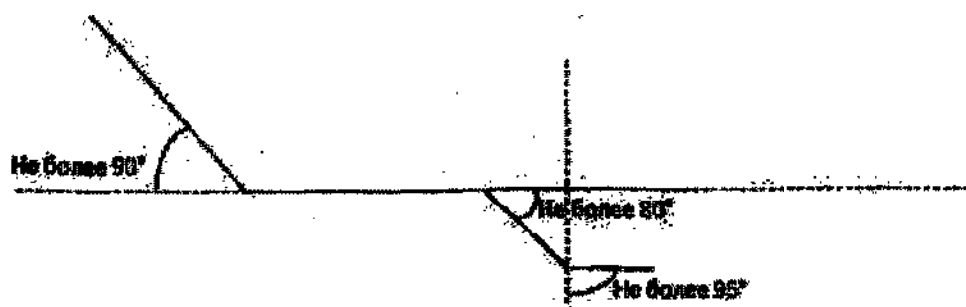

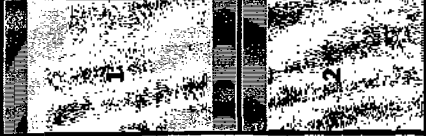
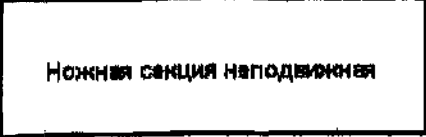
Секция спины (вид спереди)




Таблица 45Б
Вариант 7.2.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина центральной секции спины	не более 900 мм
Ширина центральной секции спины	не более 800 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции анатомической поддержки таза	не более 300 мм
Ширина секции анатомической поддержки таза	не более 600 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки: Секция спины	механическая
Тип регулировки: Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки: Икроножно-опорная секция	растопы
Тип регулировки: Боковая поддержка секции спины	автоматическая
Тип регулировки: Анатомическая поддержка секции таза	автоматическая
Кол-во механических приводов базовой комплектации	2 шт.
Растопы	1 шт.


Тип 7.3 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание + поддержка секции спины

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
	Анатомическая поддержка секции таза	Бедренно-икроножная секция	Икроножно-опорная
Боковая поддержка секции спины	 Не более 25°	Ножная секция неподвижная	
			
	 Не более 25°	Ножная секция неподвижная	
Боковая поддержка секции спины			

Кровать. Вид сбоку (вариант поднятия ножной секции вверх)

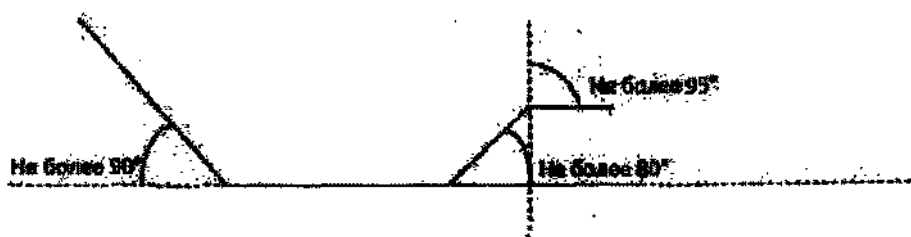

Кровать. Вид сбоку (вариант опускания ножной секции вниз)

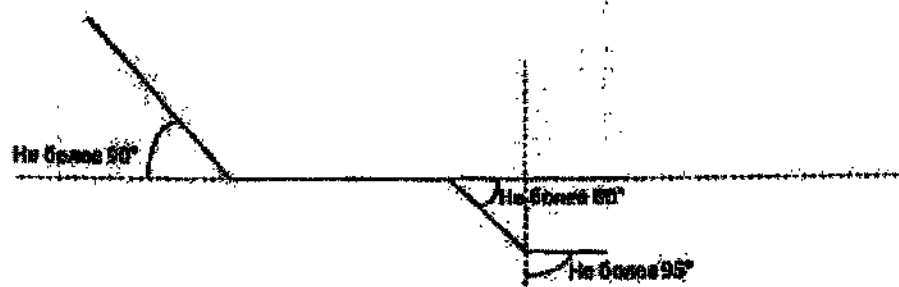

Секция спины (вид спереди)



Таблица 46Б


Вариант 7.3.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина секции анатомической поддержки таза	не более 300 мм
Ширина секции анатомической поддержки таза	не более 600 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки: Секция спины	механическая
Тип регулировки: Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки: Икроножно-опорная секция	растомат
Тип регулировки: Боковое переворачивание секция	механическая
Тип регулировки: Боковая поддержка секции спины	автоматическая
Тип регулировки: Анатомическая поддержка секции таза	автоматическая
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	1 шт.
Растомат	1 шт.


Тип 7.4 (регулировка секции спины единой и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + секции туалетного выреза

Секция спины	Секция таза		Ножная секция	
	Анатомическая поддержка секции таза	Секция таза	Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная
	Не более 25° Не более 90°	Секция туалетного выреза	Ножная секция неподвижная	
			Ножная секция неподвижная	

Кровать. Вид сбоку (вариант поднятия ножной секции)

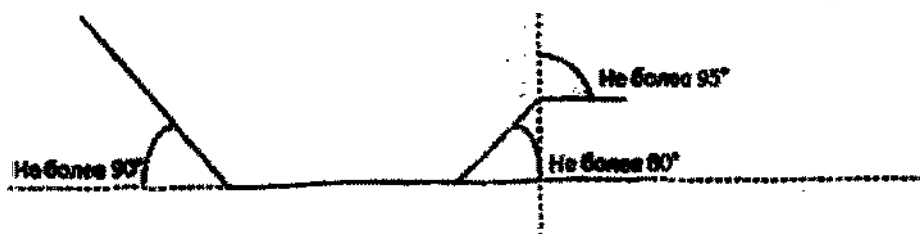

Кровать. Вид сбоку (вариант опускания ножной секции)

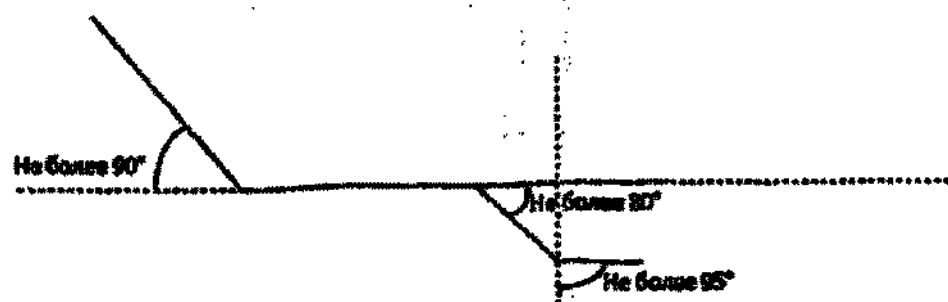

**Таблица 47Б
Вариант 7.4.1**


Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции таза	не более 600 мм

Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции анатомической поддержки таза	не более 300 мм
Ширина секции анатомической поддержки таза	не более 600 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки. Секция спины	механическая
Тип регулировки. Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки. Икроножно-опорная секция	растопыра
Тип регулировки. Анатомическая поддержка секции таза	автоматическая
Тип регулировки. Секция туалетного выреза	механическая
Количество механических приводов в базовой комплектации	2 шт.
Растопыра	1 шт.
Тип регулировки. Секция спины	механическая
Тип регулировки. Бедренно-икроножная секция	механическая


Тип 7.5 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
		Бедренно-икроножная	Икроножно-опорная секция
	Анатомическая поддержка таза		
		Ножная секция неподвижная	
	Секция туалетного биде		
		Ножная секция неподвижная	

Кровать. Вид сбоку (вариант поднятия ножной секции вверх)

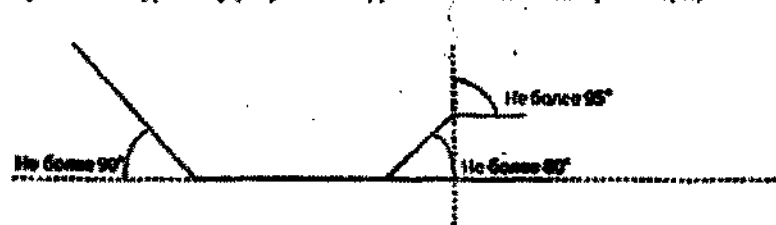

Кровать. Вид сбоку (вариант опускания ножной секции вниз)

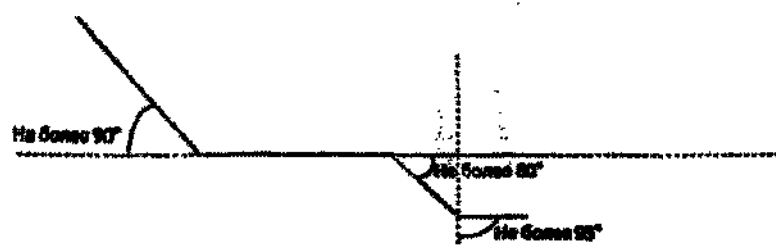

Секция спины (вид спереди)




Таблица 48Б
Вариант 7.5.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции анатомической поддержки таза	не более 300 мм
Ширина секции анатомической поддержки таза	не более 600 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки: Секция спины	механическая
Тип регулировки: Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки: Икроножно-опорная секция	растомат
Тип регулировки: Боковое переворачивание: секция	механическая
Тип регулировки: Анатомическая поддержка секции таза	автоматическая
Тип регулировки: Секция туалетного выреза	механ. рычаг
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	3 шт.
Растомат	1 шт.


Тип 7.6 (регулировка спинной секции (разделение на 1 центральную секцию и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + поддержка секции спины + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
	Анатомическая поддержка секции таза	Бедренно-икроножная секция (1)	Икроножно-опорная секция (2)
Боковая поддержка секции спинной	Секция туалетного выреза	Ножная секция неподвижная	
		Ножная секция неподвижная	

Кровать. Вид сбоку (вариант поднятия ножной секции вверх)

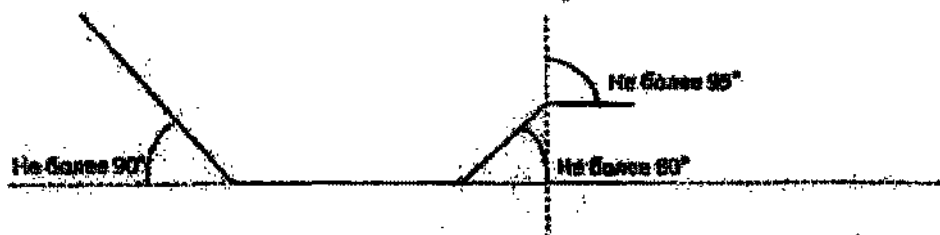

Кровать. Вид сбоку (вариант опускания ножной секции вниз)

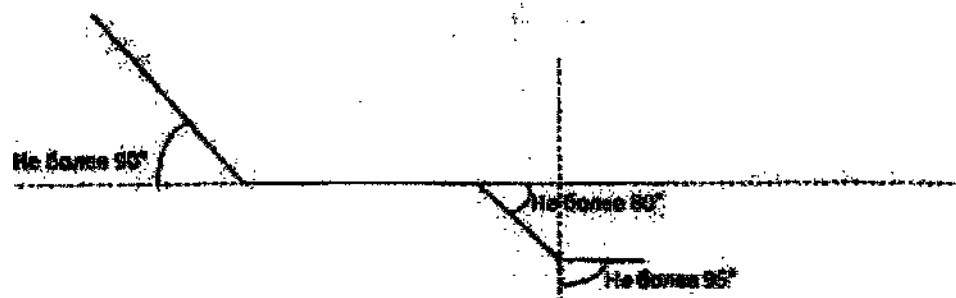

Секция спины (вид спереди)



Таблица 49Б
Вариант 7.6.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина центральной секции спины	не более 900 мм
Ширина центральной секции спины	не более 800 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции анатомической поддержки таза	не более 300 мм
Ширина секции анатомической поддержки таза	не более 600 мм
Длина секции бедренно-икрующей секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икрующей секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки Секция спины	механическая
Тип регулировки Бедренно-икрующая секция	механическая
Тип регулировки Икроножно-опорная секция	растопат
Тип регулировки Боковая поддержка секции спины	автоматическая
Тип регулировки Анатомическая поддержка секции таза	автоматическая
Тип регулировки Секция туалетного выреза	мех. рычаг
Количество механических приводов в базовой комплектации	3 шт.
Растопат	1 шт.


Тип 7.7 (регулировка спинной секции (разделение на 2 секции бокового переворачивания и 2 секции боковой поддержки) и ножной секции (разделение на ножные неподвижные, бедренно-икроножную и икроножно-опорную секции)) + секции анатомической поддержки таза + боковое переворачивание + поддержка секции спины + секция туалетного выреза

Секция спины	Секция таза	Ножная секция	
	Анатомическая поддержка секции таза	Бедренно-икроножная секция (1)	Икроножно-опорная секция (2)
Боковая поддержка секции спины	Секция туалетного выреза	Ножная секция неподвижная	
Боковая поддержка секции спины		Ножная секция неподвижная	

Кровать. Вид сбоку (вариант поднятия ножной секции вверх)



Кровать. Вид сбоку (вариант опускания ножной секции вниз)

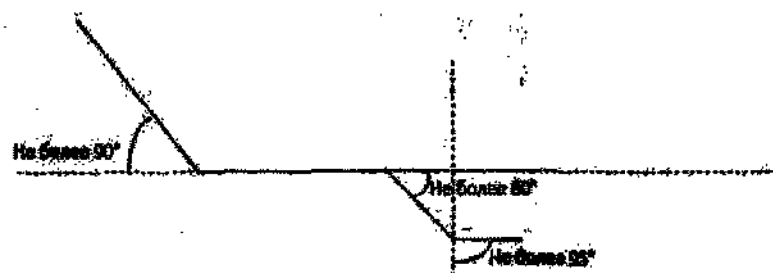

Середина спины (вид сверху)

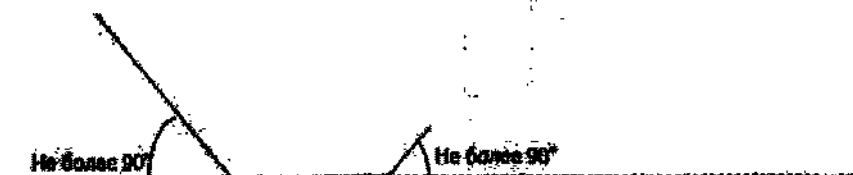


Таблица 50Б
Вариант 7.7.1

Параметр	Значение
Длина ложа кровати	не более 2200 мм
Ширина ложа кровати	не более 1400 мм
Длина секции спины	не более 900 мм
Ширина секции спины	не более 1400 мм
Длина секции бокового переворачивания левая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания левая	не более 500 мм
Длина секции бокового переворачивания правая	не более 900 мм
Ширина секции бокового переворачивания правая	не более 500 мм
Длина секции боковой поддержки спины левой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины левой	не более 200 мм
Длина секции боковой поддержки спины правой	не более 900 мм
Ширина секции боковой поддержки спины правой	не более 200 мм
Длина секции таза	не более 600 мм
Ширина секции таза	не более 1400 мм
Длина туалетного выреза	не более 350 мм
Ширина туалетного выреза	не более 250 мм
Длина секции анатомической поддержки таза	не более 300 мм
Ширина секции анатомической поддержки таза	не более 600 мм
Длина секции бедренно-икроножной секции	не более 500 мм
Ширина секции бедренно-икроножной секции	не более 1100 мм
Длина икроножно-опорной секции	не более 750 мм
Ширина икроножно-опорной секции	не более 1100 мм
Длина ножной неподвижной секции левой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции левой	не более 500 мм
Длина ножной неподвижной секции правой	не более 900 мм
Ширина ножной неподвижной секции правой	не более 500 мм
Высота ложа кровати	не более 800 мм
Тип регулировки: Секция спины	механическая
Тип регулировки: Бедренно-икроножная секция	механическая
Тип регулировки: Икроножно-опорная секция	растопат
Тип регулировки: Боковое переворачивание секция	механическая
Тип регулировки: Боковая поддержка секции спины	автоматическая
Тип регулировки: Анатомическая поддержка секции таза	автоматическая
Тип регулировки: Секция туалетного выреза	механ. рычаг
Кол-во механических приводов в базовой комплектации	3 шт
Растопат	1 шт

Технические характеристики основных частей медицинского изделия

Таблица 51Б

Изголовье/Изножье

	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4	Тип 5	Тип 6	Тип 7	Тип 8
Материал	АБС пластик	ЛДСП	Массив дерева	HPL	Трубки из нержавеющей стали	Алюминиевые трубки	ДСП, обтянутая искусственной кожей	Полипропилен
Размер головного торца, не менее мм	945*375*15	935*450*25	945*545*25	955*375*56	955*375*56	955*375*56	955*375*56	955*375*56
Размер ножного торца, не менее мм	945*350*15	935*375*25	945*375*25	955*375*56	955*375*56	955*375*56	955*375*56	955*375*56
Угловые бамперы роллера типа	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	-	опционально
Пластиковые угловые бамперы	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	-	опционально
Вставки (опционально)	Нержавеющая сталь/ Алюминий/ ЛДСП/ HPL	Нержавеющая сталь/ Алюминий/ ЛДСП/ HPL	Нержавеющая сталь/ Алюминий/ ЛДСП/ HPL	Нержавеющая сталь/ Алюминий/ ЛДСП/ HPL	ЛДСП/ HPL	ЛДСП/ HPL		Нержавеющая сталь/ Алюминий/ ЛДСП/ HPL
Уголок для увеличения пространства	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально

Таблица 52Б

Боковые ограждения

Тип	Материал	Тип ограждений	Количество опор	Угломеры	Размер, не менее мм	Фото	Количество
Тип1	АБС пластик	Откидные, газлифты	1	Опционально	720*310*35		2
Тип2	Полипропилен	Откидные, газлифты	1	Опционально	1070*32/80*32		4
Тип3	ЛДСП (царга)	-	-	Опционально	1890*380*30		5
Тип4	Алюминий, сталь нержавеющая, АБС пластик	Складные	4	Опционально	960*350*30		2
Тип5	Алюминий, сталь, АБС пластик	Складные	6	Опционально	1480*360*30		2
Тип6	Алюминий, сталь, АБС пластик	Складные	5	Опционально	1320*360*30		2
Тип7	Алюминий, сталь, АБС пластик	Складные	5	Опционально	1220*330*30		2

Тип8	Алюминий, сталь, АБС пластик	Складные	5	Опционально	1220*300*30		2
Тип9	Алюминий, сталь, АБС пластик	Складные	6	Опционально	1480*285*30		2
Тип10	Нержавеющая сталь	Откидные	2		960*350*30		2

Таблица 53Б

Рама для подтягивания

<i>Рама для подтягивания</i>	<i>Встраиваемая Тип 1 (Классическая)</i>	<i>Встраиваемая Тип 2 (Степанова)</i>	<i>Передвижная Тип 1</i>	<i>Передвижная Тип 2</i>
<i>Регулировка высоты расположения ручки для пациента относительно ложемента, мм</i>	опционально	опционально	опционально	опционально
<i>Регулировка по высоте, мм</i>	опционально	опционально	опционально	опционально
<i>Диаметр стойки, не менее мм</i>	30		40	32
<i>Материал</i>	Стальная труба, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью / нержавеющая сталь	Стальная труба, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью	Стальная труба, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью	Стальная труба, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью
<i>Размеры основания, мм</i>			945*710	1350*660

Таблица 54Б

Туалетное устройство

	Тип 1	Тип 2
Привод	Червячный механический	Червячный механический
Размеры выреза под туалетное устройство, мм	325*195 мм	240*190
Размеры туалетного судна, не менее мм	Ø 285*157 мм	320*230*50
Функция "самотуалет"	опционально	опционально
Функция "хВЮ"	опционально	опционально
Фото		

Таблица 55Б

Инфузионная стойка (Стационарная)

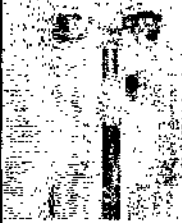
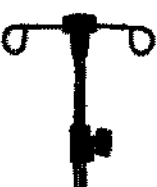
	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4	Тип 5	Тип 6
Количество крючков	2	4	4	4	4	2
Регулировка по высоте, мм	+	+	+	+	+	+
Размер (высота), мм	840-1560	780-1470		885-1640	825-1530	850-1530
Диаметр, не менее мм	19	19	19	22	19	19
Регулировка высоты	Барашковый винт	Пластиковая затяжная ручка	Барашковый винт	Барашковый винт	Пластиковая затяжная ручка	Барашковый винт
Фото						

Таблица 56Б

Инфузионная стойка (Мобильная)

	Тип 7	Тип 8	Тип 9	Тип 10	Тип 11
Количество крючков	4 (откидные)	4 (откидные)	2 крючка (откидные) 2 держателя инфузионных флаконов	2 крючка (откидные) 2 держателя инфузионных флаконов	4 (откидные)
Держатели для инфузионных флаконов	опционально	опционально	опционально	опционально	
Регулировка по высоте, мм	+	+	+	+	+
Размер (высота), мм	1310-2250	1160-2070	1117-2050	1180-2100	1117-2050
Диаметр, не менее мм	19	19	19	19	15
Регулировка высоты	Барашковый винт	Пластиковая затяжная ручка	Пластиковая затяжная ручка	Барашковый винт	Барашковый винт
Количество колес, не менее шт	5	5	5	5	5
Диаметр колес, не менее мм	40	40	40	40	40
Тормоза	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально
Фото					

Таблица 57Б

Ванночка для головы

Материал	Пластик
Описание	Ванночка для мытья головы с вырезом для шеи, опорой для затылка и система слива воды
Размер	460*345*120 мм
Фото	

Таблица 58Б

Колеса и тормозная система

Тип	Тормозная система	Диаметр колес, не менее мм	Материал	Тип колес
Тип1	Индивидуальный тормоз на 2 колеса	100	Полиуретан	Одинарные
Тип2	Индивидуальный тормоз на 2 колеса	100	Полиуретан	Сдвоенные
Тип3	Индивидуальный тормоз на 4 колеса	100	Полиуретан	Одинарные
Тип4	Индивидуальный тормоз на 4 колеса	100	Полиуретан	Сдвоенные
Тип5	Центральный тормоз в 2-х положениях (ножной рычаг)	100	Полиуретан	Одинарные
Тип6	5е колесо	100	Полиуретан	Одинарные
Тип7	Центральный тормоз в 2-х положениях (ножной рычаг)	100	Полиуретан	Сдвоенные
Тип8	Центральный тормоз в 4-х положениях (ножной рычаг)	100	Полиуретан	Одинарные

Тип 10	Центральный тормоз в 4-х положениях (ножной рычаг)	100	Полиуретан	Сдвоенные
--------	--	-----	------------	-----------

Таблица 59Б

Ручки управления

Тип	Размеры, не более мм
Ручка управления туалетным устройством	350*200*40
Ручка управления механическим приводом	350*200*40

Таблица 60Б

Прикроватный столик

	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4	Тип 5
Описание	Прикроватный столик подкатной с двумя столешницами	Прикроватный столик подкатной с двумя столешницами	Прикроватный столик подкатной с поворотным столом и тумбой	Прикроватный столик подкатной	Прикроватный столик Съемный столик
Размер неподвижной столешницы, не менее мм	200*400*20	195*400*28	479*439		1025*305*30
Размер подвижной столешницы, не менее мм	600*400*20	585*400*20	600*400*20		
Высота, не менее мм	700-1100	690-1100	670-1100		
Размеры тумбы, не менее мм			780*470*430	470*470*750	
Фото					

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
114 (подпись)) листа (ов)
Генеральный директор Ватая В.В.
Подпись

