


 Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" Москва, Россия
 Адрес: Москва, ул. Саввинское, д. 24, пом. 1 (стр. 100-01-25)
 Тел: (495) 551-0000, факс: (495) 551-0001, e-mail: info@factor-med.ru, www.factor-med.ru

НАБОР РЕАГЕНТОВ
ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР
 для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ-1/2) экспресс-методом

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
 1. Вскрыть пакет и достать планшет.
 2. Планшет, на котором расположены реактивы, хранить в упаковке до момента вскрытия. При вскрытии планшета температура (18-25°C) должна быть выдержана. При вскрытии планшета реактивы должны быть защищены от влаги.
 3. Добавить в планшет для каждого образца реактивы: 1 каплю (1-30-40 мкл) в первую лунку (контроль), 1 каплю (1-30-40 мкл) в каждую лунку (образцы).
 4. В лунку с образцами добавить 3-4 капли (1-120-140 мкл) раствора для развития реакции и через 10 минут (от момента добавления раствора) считать результат реакции.
 Хранить в сухом месте при температуре 2-30°C.

Планшет для анализа
 Планшет для анализа

4 607024 180133

Серия №
 Годен до:


 Изготовитель: ООО "ФАКТОР-МЕД" Москва, Россия
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР
 для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ-1/2) экспресс-методом

САЛФЕТКА
 ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ВИЧ-МЕД

ОДНОРАЗОВАЯ
 Размер 30 x 80 мм
 Срок хранения 3 года

СЕРТИФИКАТ


 ОТЕЧЕСТВО
 Тел: 800-501-0001/14750-3000
 Москва
 ООО "ФАКТОР-МЕД"

