

11007 REF: 230110 LOT 13 cm / 200 cm

Пессарий акушерский разгружающий однократного применения ТИП 3

ТУ 14401916.01-91

Стерильно, асептично, нестерилизуемо. Не использовать повторно.

10.007

ГОД ДО: 2020-10

Симург

www.simurg-mp.com

RU
Пессарий акушерский разгружающий однократного применения. Для профилактики преждевременных родов при истмико-цервикальной недостаточности.

GB
Disposable obstetrical pessary. For prophylaxis of preterm delivery in case of isthmio-cervical insufficiency.

DE
Obstetrischer Einwegpessar. Für die Prophylaxe der Frühgeburt bei isthmio-zervikaler Insuffizienz.

RO
Pesar obstetric de unica folosinta. Pentru profilaxia nasterilor premature si insuficienta istmico-cervicala a colului uterin.

UA
Пессарій акушерський розвантажувачий одноразового застосування. Для профілактики передчасних пололів при істміко-цервікальній недостатності.

Пессарий акушерский разгружающий однократного применения ТИП 3

ТУ 14401916.01-91

Стерильно, асептично, нестерилизуемо. Не использовать повторно. Не применять при порывах и разрывах плодных оболочек. Осторожно! Соревити з попередньої доповіді.

Серия: 151007

Годен до: 2020-10

Симург

www.simurg-mp.com

Изготовитель:
ЗАО "Медицинское предприятие "Симург"
пр. Лядников, 13-413, 210023, Витебск, Республика Беларусь, www.simurg-mp.com

ЗАО "Медицинское предприятие "Симург"
18th line, V.O., d. 31, 199178, Saint Petersburg, Russian Federation.

Manufacturer:
CISC "Medical enterprise Simurg"
pr. Lyudnikova 13-413, 210023, Vitebsk, the Republic of Belarus, www.simurg-mp.com

CISC "Medical enterprise "Simurg"
18th line, V.O., d. 31, 199178, Saint Petersburg, the Russian Federation, www.mp-simurg.ru

天寶紅印標記為特色
grün-grün-weiß-grün

Пессарий акушерский разгружающий однократного применения (далее по тексту - пессарий) предназначен для профилактики развития данной патологии.

Показания к применению

- Функциональная и органическая истмико-цервикальная недостаточность.
- Профилактика истмико-цервикальной недостаточности в базовых.
- Профилактика неосложненной шейки при угрозе преждевременных родов.

Основание акушерского пессария

Изготовлен из бесцветного полипропилена. Пессарий имеет следующие размеры:

Показатели	1 тип	2 тип	3 тип
Длина	30±2,5	37±2,5	37±2,5
Ширина	58±2,5	73±2,5	83±2,5
Высота	60±2,5	70±2,5	80±2,5
Толщина	15±2,5	15±2,5	15±2,5

Противопоказания

Абсолютные:

- «данный метод, не следует использовать в клинических ситуациях, когда применение пессария противопоказано по медицинским показаниям;
- анатомические особенности пациентки, препятствующие правильному расположению пессария;
- инфекционные заболевания влагалища, шейки матки, наружных половых органов (требуется предварительная санация с последующим бактериологическим контролем).

Предостережения:

- при применении акушерского разгружающего пессария возможно усиление влагалищной реакции;
- пессарий акушерский не предназначен для коррекции пролапса тазового дна;
- недопустимо применение пессария при нарушении целостности плодной оболочки или при повышении сроков беременности, указанных на упаковке.

Выбор типа пессария акушерского

Выбор типа пессария зависит от индивидуальных анатомических особенностей пациентки. Рекомендации по выбору типа пессария акушерского приведены в табл. 2.

Введение и извлечение пессария акушерского

Введение и извлечение акушерского разгружающего пессария производятся в стерильных условиях.

Таблица 2

Размер верхней трети влагалища, см	Диаметр шейки матки, мм	Размер пессария	Тип пессария
55-65	25-30	меньше 2	1
66-75	25-30	меньше 2	2
76-85	30-37	2 и более	3

Введение и извлечение пессария не требует анестезии. Для облегчения введения целесообразно обработать пессарий и половые органы женщины мылом, разведенным в соответствии с рекомендациями.

Условия для введения пессария:

- отсутствие при менструации и беременности;
- нормальный тонус матки;
- согласие пациентки.

Введение пессария проводится с соблюдением асептических правил введения.

После осмотра женщины при спонтанном выхождении пессария вынуть пессарий акушерский так, чтобы широкая сторона пессария была направлена в сторону входа во влагалище. Вывести пессарий акушерский из влагалища (рис. 2).

Затем, надавливая на заднюю стенку влагалища, ввести пессарий акушерский в цервикальный канал. После этого полностью ввести пессарий акушерский (рис. 3).

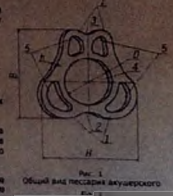


Рис. 3
Общий вид пессария акушерского

Ряд клинических ситуаций требует досрочного удаления акушерского пессария:

- необходимость экстренного родоразрешения;
- интенсивные схваточные боли;
- развитие родовой деятельности;
- разрыв плодных оболочек;
- повышение кровянистых выделений из половых путей (при необходимости возможно повторное введение пессария);
- большой синдром, обусловленный акушерским пессарием (возможно повторное введение пессария меньшего размера).

Обследование и наблюдение за беременными, использующими пессарий акушерский

Обследование проводится акушерско-гинекологическое обследование. Влагалищный мазок каждые 14-21 день. Вспомогательное обследование: УЗИ (раз в 4 недели), УЗИ (раз в 4 недели). Лечение ИМП с помощью пессария акушерского может сочетаться с любой терапией ИМП. В случае необходимости пессарий акушерский может быть удален досрочно. При этом пессарий акушерский не следует использовать повторно. После удаления пессария акушерского необходимо удалить устройство, вынуть пессарий акушерский.

Рекомендации для пациентки

Пессарий акушерский извлечь.