


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Гемолизующий раствор”
 вариант комплектации 1, серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2020 г.

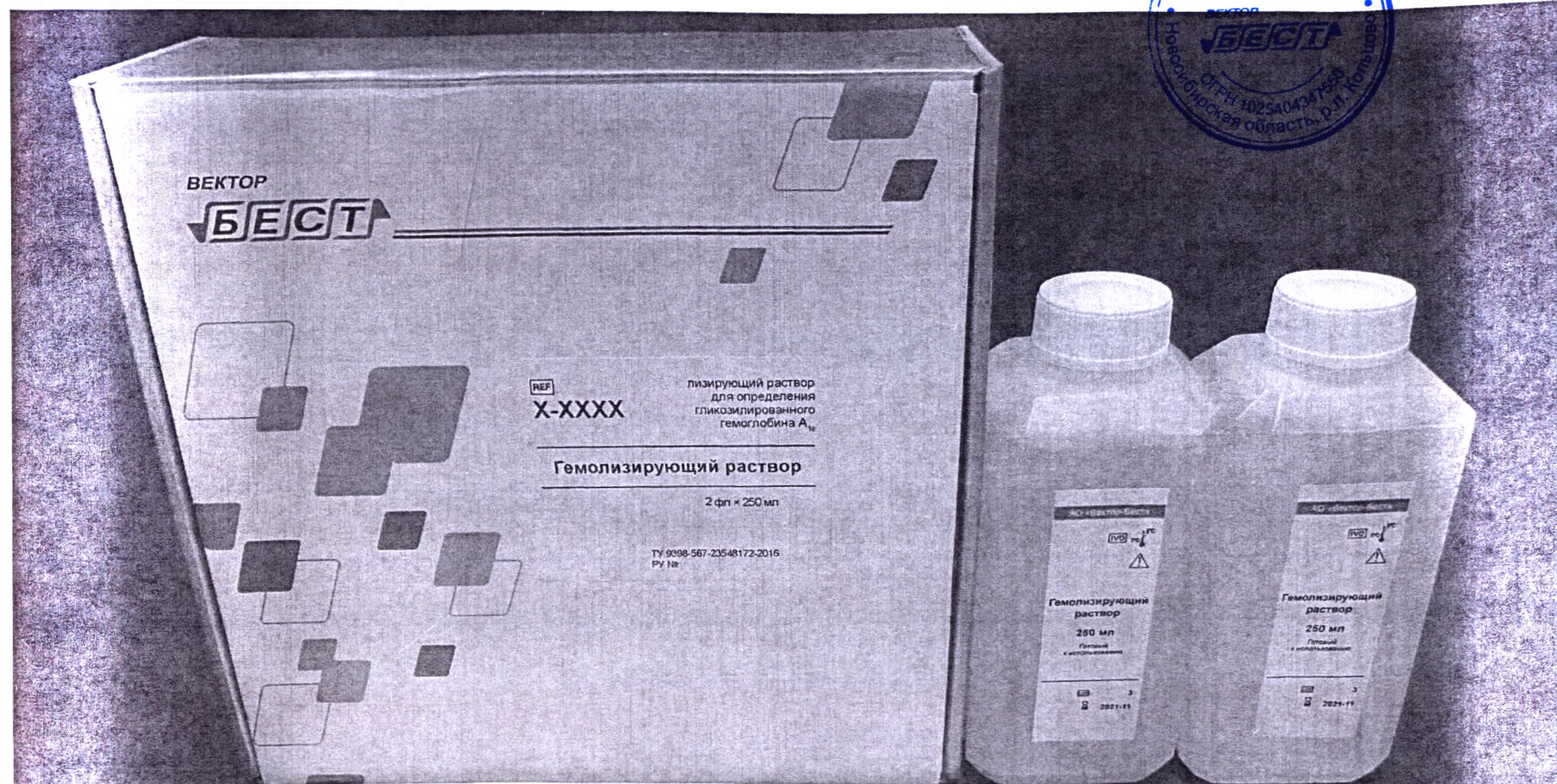

ВЕКТОР BEST

ИНСТРУКЦИЯ
 по применению лизирующего раствора для определения гликозилированного гемоглобина A_{1c}
 (Гемолизующий раствор)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Лизирующий раствор для подготовки проб при определении содержания гемоглобина A_{1c} (HbA_{1c}) по отношению к уровню человеческого иммуноглобулинового G-гена «Гликогемоглобин латекс» (пр-в Бест).

1.2. Лизирующий раствор выпускается в двух вариантах комплектации:

Вариант комплектации	Количество проб	Расход, мл
1	250	
2	500	

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Принцип действия. Действие лизирующего раствора направлено на разрушение эритроцитов человека, содержащихся в пробе крови. В результате лизирования гемоглобин A_{1c} становится доступен для определения.

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»
 Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
 Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44
 www.vector-best.ru
 vbobk@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 16-19
Гемолизующий раствор
 Лизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина A_{1c}
 Номер серии 3


Хранить при температуре 2-8°C
 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Дата изготовления 2019-11
 Дата выдачи паспорта 2019-11-26
 Срок годности наборов до 2021-11

Состав

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Гемолизирующий раствор" №1
вариант комплектации 1, серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.

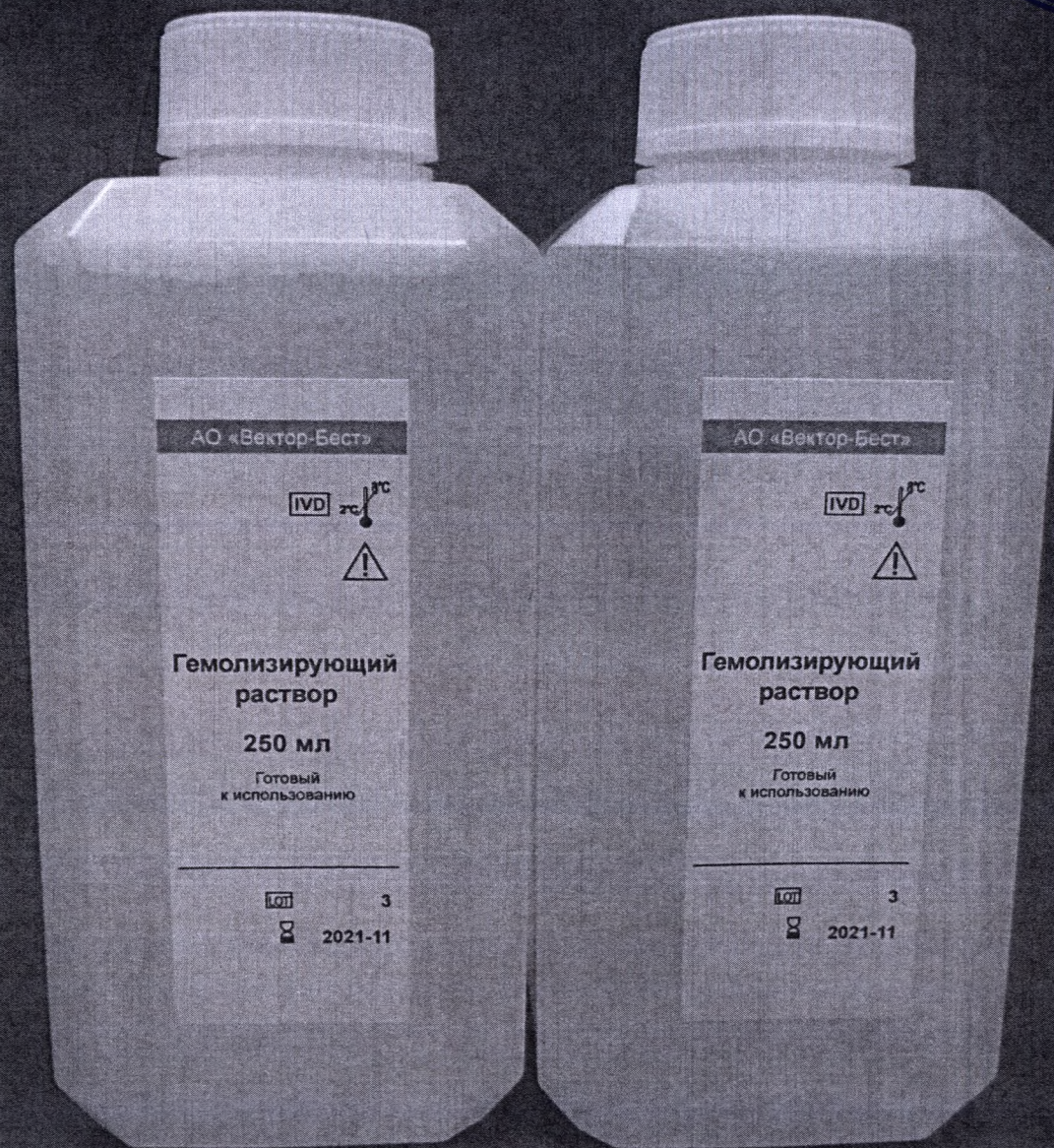

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Гемолизирующий раствор" №1
вариант комплектации 1, серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

X-XXXX

лизирующий раствор
для определения
гликозилированного
гемоглобина A_{1c}

Гемолизирующий раствор

2 фл × 250 мл

ТУ 9398-567-23548172-2016
РЧ №


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Гемолизирующий раствор" №2
вариант комплектации 1, серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Гемолизирующий раствор”
 вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2020 г.

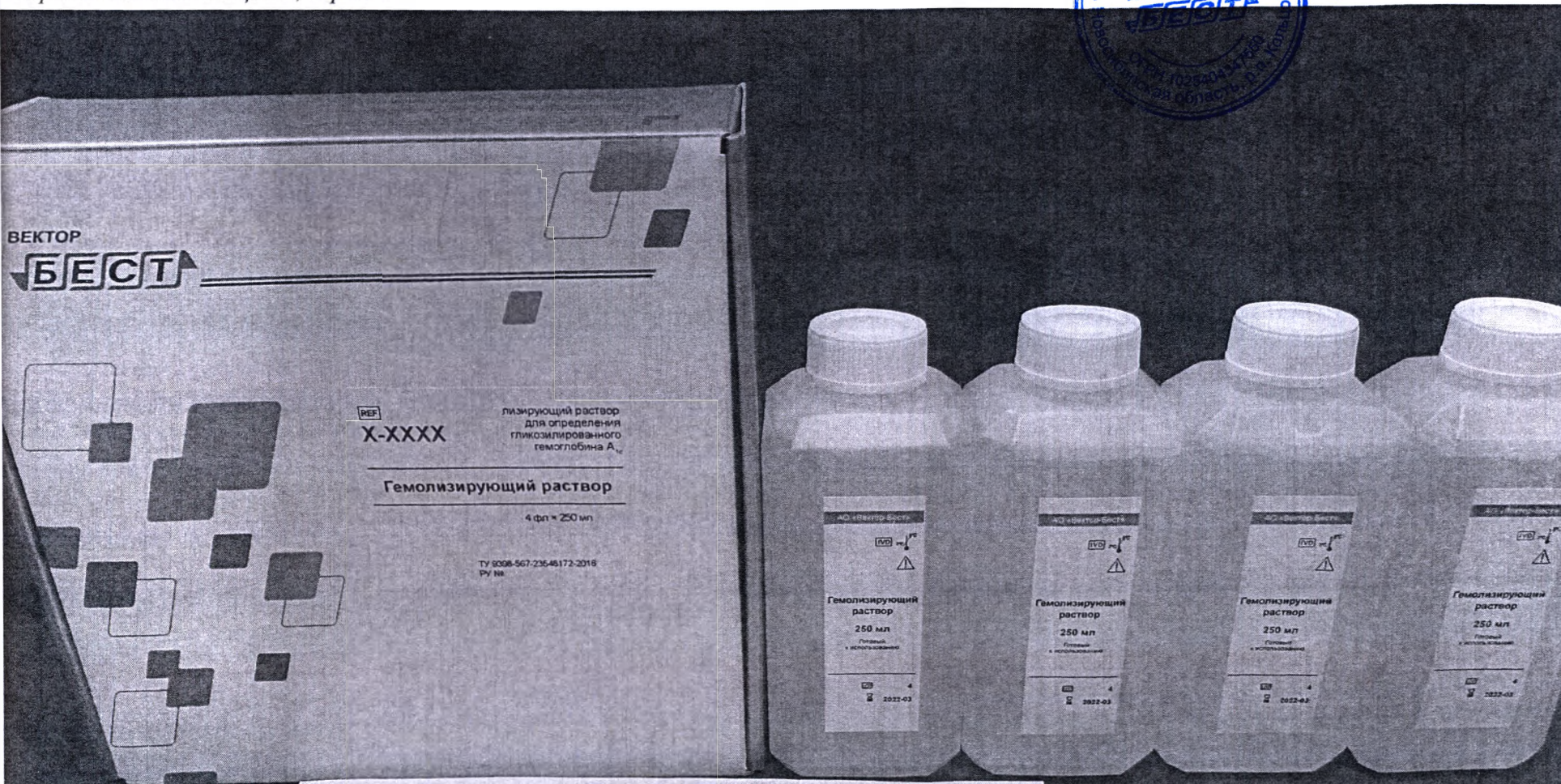

ВЕКТОР БЕСТ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лизирующего раствора для определения гликозилированного гемоглобина A1c
(Гемолизирующий раствор)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
 1.1. Лизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина A1c «Гемолизирующий раствор» предназначен для приготовления проб при определении содержания гликозилированного гемоглобина A1c (HbA1c) по отношению к общему гемоглобину человека иммунотурбидиметрическим методом готов «Гликогемоглобин латекс» (производства «Бест»).

1.2. Лизирующий раствор выпускается в двух комплектациях:

Вариант комплектации	Количество проб	Расход на одну пробу, мл
1	250	2,0
2	500	2,0

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА
 2.1. Принцип действия
 Действие лизирующего раствора основано на разрушении эритроцитов в пробе, содержащей гликозилированный гемоглобин A1c, в растворе. В результате лизирования гликозилированного гемоглобина A1c высвобождается свободный гемоглобин A1c.

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»
 Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
 Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44
 www.vector-best.ru
 vbobik@vector-best.ru

ПАСПОРТ № окт.20
Гемолизирующий раствор

Лизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина A1c


Номер серии **4**

Дата изготовления **2020-03**
 Дата выдачи паспорта **2020-03-24**
 Срок годности наборов до **2022-03**

Хранить при температуре 2-8°C
 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Гемолизирующий раствор” №1
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2020 г.

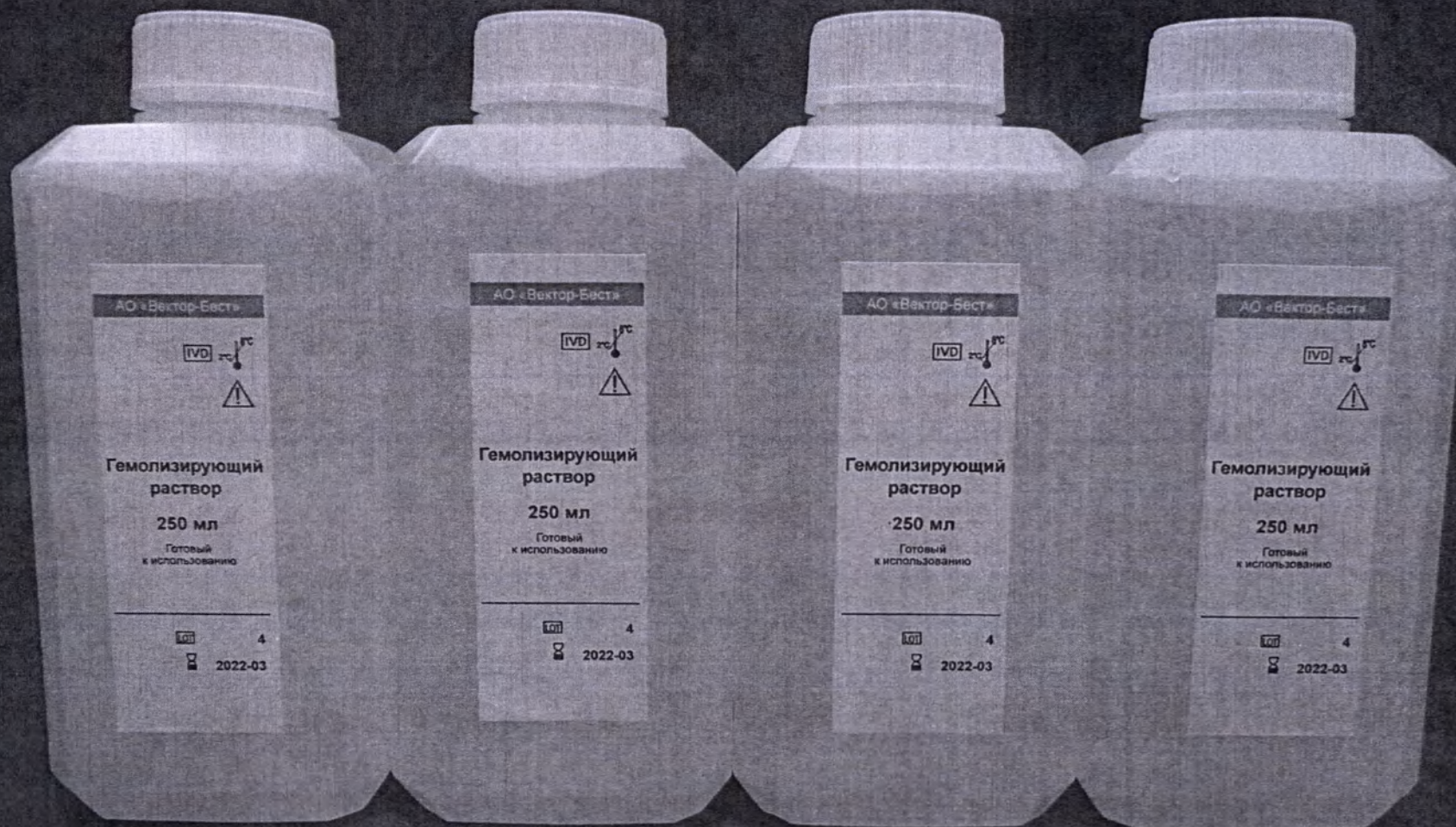

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Гемолизирующий раствор" №1
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

X-XXXX

лизирующий раствор
для определения
гликозилированного
гемоглобина A_{1c}

Гемолизирующий раствор

4 фл × 250 мл

ТУ 9398-567-23548172-2016
РУ №

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Гемолизирующий раствор" №2
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.

