


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
"Контроль гликогемоглобин"
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.

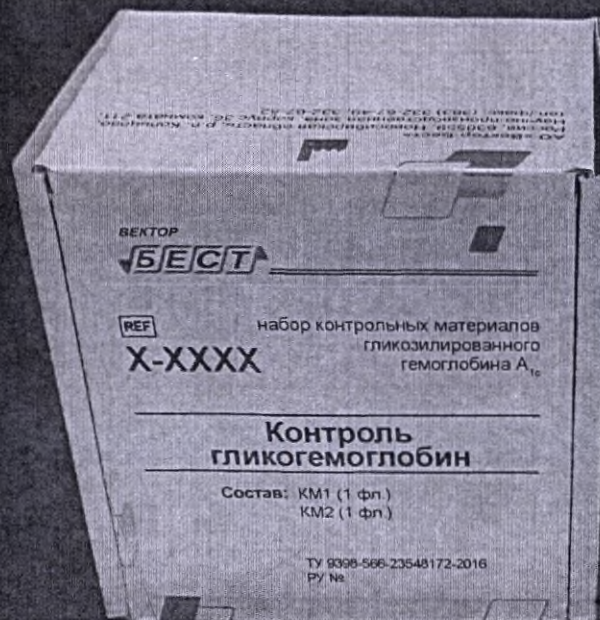

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора контрольных материалов гликозилированного гемоглобина A_{1c}

(Контроль гликогемоглобин)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор контрольных материалов гликозилированного гемоглобина A_{1c} «Контроль гликогемоглобин» предназначен для проведения контроля качества при определении содержания гемоглобина A_{1c} (HbA_{1c})

иммунотурбидиметрическим методом измерения общего гемоглобина набором реактивов «Контроль гликогемоглобин» (производства АО «Вектор-Бест»).

1.2. Набор рассчитан на приготовление 10 флаконов.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Принцип действия

Все фракции гемоглобина крови, находясь на поверхности частиц латекса в образце, HbA_{1c} взаимодействует с реагентом, содержащим в своем составе реагент, реагирующий с HbA_{1c} человека, в результате чего происходит изменение оптической плотности раствора.

2.2. Состав набора

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»

Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492

Приемная: тел. (383)-227-60-30,

факс (383)-332-94-44

www.vector-best.ru

vbobtk@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 10-20

Контроль гликогемоглобин

X-XXXX

Набор контрольных материалов гликозилированного гемоглобина A_{1c}

Номер серии 4

Хранить при температуре 2-8°C

Дата изготовления 2020-02

Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Дата выдачи паспорта 2020-02-20

Срок годности наборов до 2021-08

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Контроль гликогемоглобин” №1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Вест” М.Д. Хусаинов
2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Контроль гликогемоглобин" №2
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
11/ 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Контроль гликогемоглобин» №3
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2020 г.

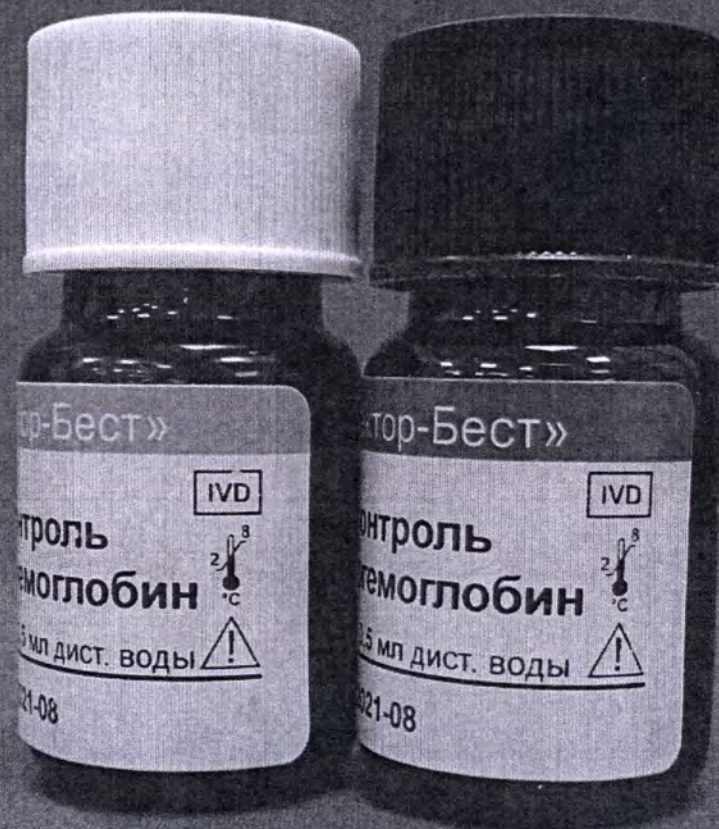

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Контроль гликогемоглобин” №1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“12” 2020 г.

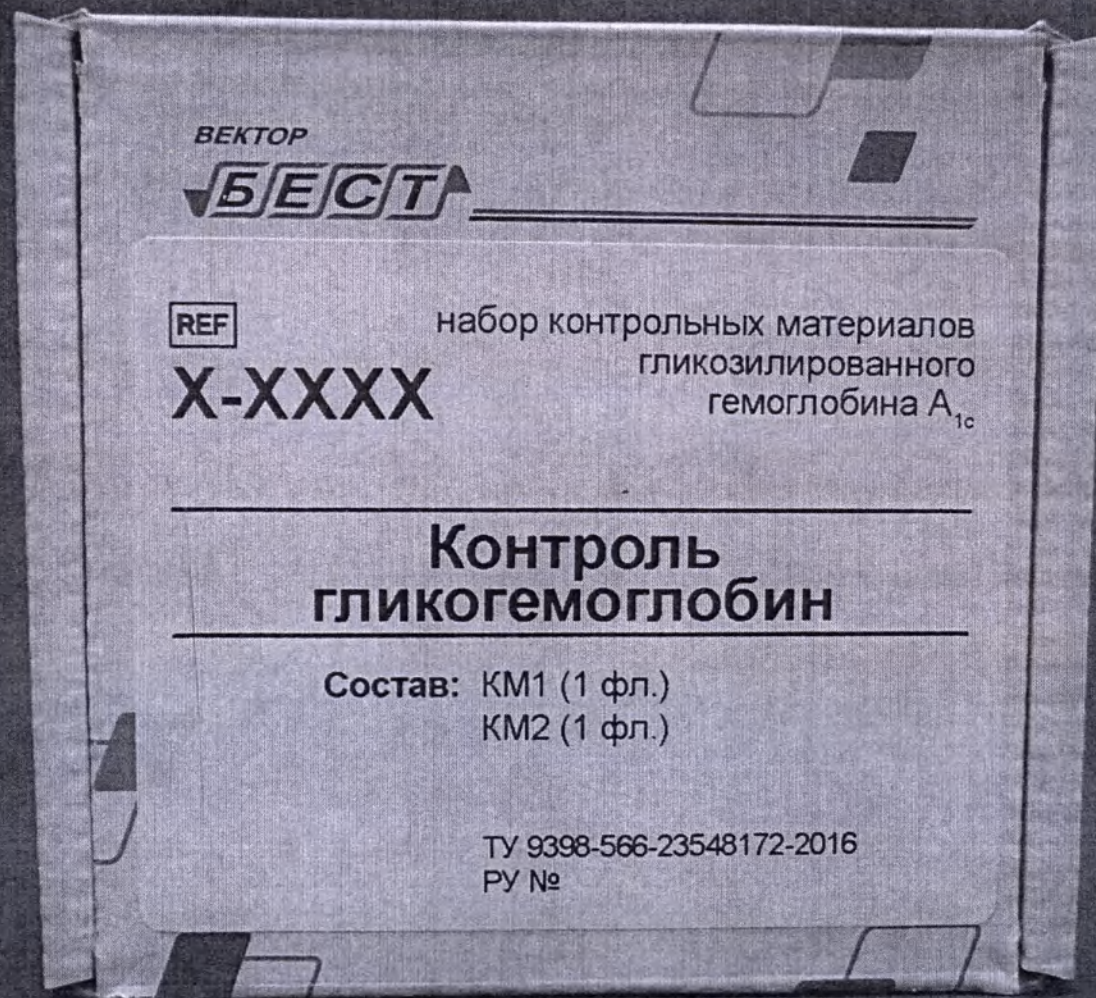

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Контроль гликогемоглобин" №2
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12" 2020 г.

