



**ЖГУТ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
РЕЗИНОВЫЙ ЭСМАРХА**

ТУ 9398-002-00149535-2007
РП № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021г.



ISO 9001:2015

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха предназначен для временной остановки кровотечения, на надлежащем участке тела человека.

Область применения: в условиях лечебных или лечебно-профилактических медицинских учреждений, в военно-полевых условиях, в быту.

Показания к применению:

- первая помощь при сильном венозном или артериальном кровотечении;
- во время проведения внутривенных инъекций.

Противопоказания к применению:

- наличие гнойной раны на месте повреждения.

Возможные побочные действия – нет.

Меры предосторожности - во избежание повреждения кожных покровов, под жгут необходимо подложить мягкую ткань.

2. Эксплуатация

Перед применением жгут следует продезинфицировать полным погружением изделий в 3% раствор перекиси водорода (ГОСТ 177). Время выдержки 80 минут. По окончании дезинфекционной выдержки изделия промывают проточной водой.

3. Хранение

Жгут следует хранить в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей, и других веществ, разрушающих резину.

Дата изготовления (кв., год)

Производитель:
ООО «Объединение Альфапластик», Россия,
107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14.
Тел. (4862) 59-84-10
Сайт: www.alphaplastic.ru



4 601835 000485

4. Утилизация

Утилизация жгутов после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113. Неиспользованные жгуты по окончании срока годности относятся к медицинским отходам класса А и утилизируются как бытовые отходы.

5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок годности жгутов – 5 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – один год со дня продажи в пределах гарантийного срока годности.

Инструкция по технике наложения жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха





ООО "Объединение Альфапластик"

Жгут
кровоостанавливающий
резиновый Эсмарха



ISO 9001:2015

Количество: **50** шт.
ТУ 9398-002-00149535-2007
ПУ № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021г.

Дата изготовления (кв. , год)

Штамп ОТК

Номер упаковщика

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня
изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации –
1 год со дня продажи в пределах
гарантийного срока годности.

Производитель: ООО
"Объединение Альфапластик",

Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3
302011, г. Орел,
Новосильское шоссе, д.14



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

3 (три)

— листов

Директор ОЗРИ ООО
«Объединение Альфапластик»
С.Н. Мусатов
2022г.





**Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха
по ТУ 9398-002-00149535-2007**



ЖГУТ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
РЕЗИНОВЫЙ ЭСМАРХА

ТУ 9398-002-00149535-2007
ПУ № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021г



ISO 9001:2015

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха предназначен для временной остановки кровотечения, на надлежащем участке тела человека.

Область применения: в условиях лечебных или лечебно-профилактических медицинских учреждений, в военно-полевых условиях, в быту.

Показания к применению:

- первая помощь при сильном венозном или артериальном кровотечении
- во время проведения внутривенных инъекций.

Противопоказания к применению:

- наличие гнойной раны на месте повреждения

Возможные побочные действия – нет

Меры предосторожности - во избежание повреждения кожных покровов под жгут необходимо подложить мягкую ткань

2. Эксплуатация

Перед применением жгут следует продезинфицировать полным погружением изделий в 3% раствор перекиси водорода (ГОСТ 177). Время выдержки 80 минут. По окончании дезинфекционной выдержки изделия промывают проточной водой.

3. Хранение

Жгут следует хранить в помещении при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, масла, щелочей, и других веществ, разрушающих резину

Дата и место выработки (мб., год)

ОТ 215 2022

ЖГУТ

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха
по ТУ 9398-002-00149535-2007
(индивидуальная упаковка)


4. Утилизация
 Утилизация жгутов после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса Б после дезинфекции (профилактически). Неиспользованные жгуты по окончании срока годности относятся к медицинским отходам класса А и утилизируются как бытовые отходы.

5. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок годности жгутов — 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — один год со дня продажи в пределах гарантийного срока годности.

Инструкция по технике наложения жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха

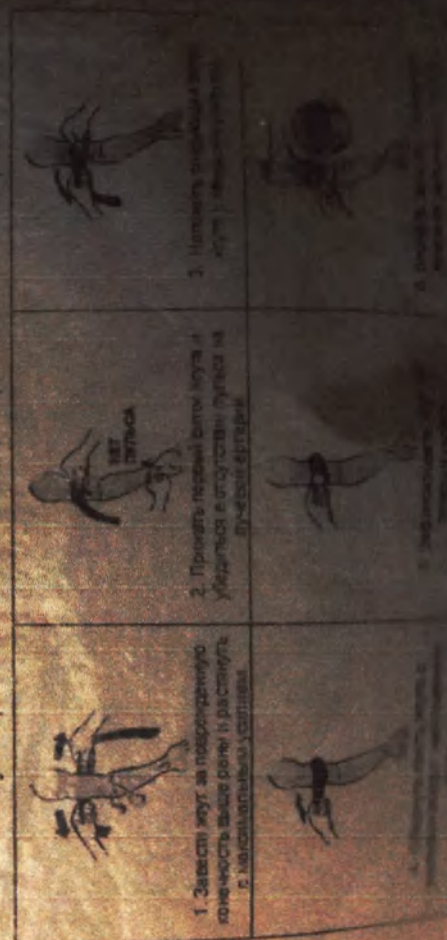

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха
 по ТУ 9398-002-00149535-2007
 (индивидуальная упаковка)

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

4 (четыре)

— листов

Директор ОЗРИ ООО
«Объединение Альфапластик»
С.Н. Мусатов
2022г.

