



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ЗАО НПО "ГАРАНТ"

Сибирцев В.В.

200 г.

М.п.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Шприцы с иглами инъекционные одноразовые объемом 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0; 100,0 см. куб. и инсулиновые одноразовые объемом 0,5; 1,0 см. куб, производства SFM HOSPITAL PRODUCTS GMBH, Германия.

Название изделия медицинского назначения: Шприцы с иглами инъекционные одноразовые объемом 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0; 100,0 см. куб. и инсулиновые одноразовые объемом 0,5; 1,0 см. куб, производства SFM HOSPITAL PRODUCTS GMBH, Германия.

Состав и описание изделия: Шприц упаковывается с надетой иглой. Таким образом, исключается попадание волокон упаковочной бумаги на детали шприца и иглу. Герметичное соединение иглы и шприца исключает потери лекарственных растворов. Цилиндр шприца абсолютно прозрачен, чтобы при введении лекарства можно было контролировать отсутствие воздушных пузырьков (исключается эмболия мелких сосудов) и оценивать надлежащий вид лекарственного средства.

Для максимально точного соблюдения дозировки шкала шприца сделана четкой и контрастной черного цвета. Шприцы номинальным объемом 5 куб.см, 10 куб.см и 20 куб.см имеют расширенную градуировку 6,12 и 24 делений в шкалах соответственно. Корпус шприца изготовлен из полипропилена с нанесенной шкалой. Шприцы комплектуются иглами разнообразных типоразмеров собственного производства. Иглы изготовлены из медицинской стали. Шприцы стерильные, предназначенные для одноразового применения.

Область применения Шприцы инъекционные предназначены для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения в организм различных жидких лекарственных средств, а также для отбора крови и отсасывания различных жидкостей из организма.

Предупреждение при использовании: Не используйте изделие, если упаковка пакета открыта или повреждена. Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции. Неправильное применение может повлечь за собой травму пациента или его смерть.

Изделие предназначено для одноразового применения. Не использовать повторно. Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия. Это устройство должно использоваться и продаваться только как шприц для инъекций одноразовый.

Внимание: Для снижения уровня риска заражением СПИДом или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.

Противопоказания: Отсутствуют.

Способ применения:

- Перед проведением инъекции персоналу следует провести обработку рук согласно принятому в клинике протоколу
- Введите иглу шприца в контейнер с лекарствами, предварительно обработав контейнер
- Заполните шприц до необходимого уровня.
Выпустите воздух из шприца.
- Произведите инъекцию, предварительно обработав место вкола.

Скольжение поршня шприцев осуществляется без рывков и обеспечивает плавность ввода лекарственных средств за счет силиконирования поршня и внутренней полости цилиндра шприца. Эти качества имеют особенно большое значение при необходимости медленных струйных вливаний, точного дозирования препаратов в анестезиологии, интенсивной терапии.

Инъекции инсулина делают подкожно в те участки тела, где есть подкожно-жировая клетчатка: в живот, переднюю поверхность бедер, заднебоковую поверхность плеч, верхнюю часть ягодиц, заднебоковую поверхность спины выше талии. Чтобы избежать липодистрофий (возникающих из-за постоянного микротравмирования тканей), рекомендуется делать уколы на расстоянии не менее 1,5 сантиметра друг от друга, а места инъекций чередовать.

Сделайте кожную складку, захватив кожу между большим, средним и указательным пальцами руки. Свободной рукой возьмите шприц как копье, обязательно придерживая средним пальцем игольную канюлю, и быстро сделайте укол (шприц при этом можно держать строго вертикально или под углом). Введя инсулин, не вынимайте иглу со шприцем в течение 5-6 секунд, чтобы предотвратить вытекание препарата из места инъекции после выхода иглы. Место введения препарата на несколько секунд прижмите ваткой со спиртом.

Упаковка: полиэтилен

Стерилизация: оксид этилена.

Утилизация: совместно с другими расходными материалами, контактировавшими с кровью, согласно принятого в клинике протокола.


Срок годности: 5 лет. Не применять после истечения срока годности!

Хранение.

Хранить шприцы в отапливаемых помещениях при температуре от +5° до +40°C и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +25°C.



ШПРИЦЫ SFM

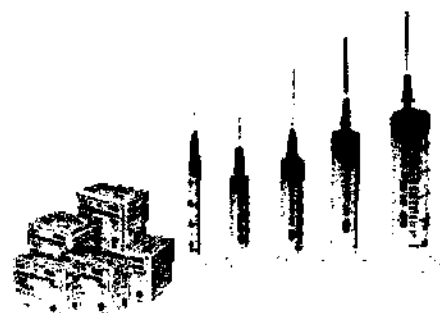

- Модифицированный упор для пальцев, имеющий особую ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции.
- Стерильная упаковка, позволяющая нестерильными руками подать шприц в стерильное поле.
- Усовершенствованное запорное кольцо, гарантирующее отсутствие потерь лекарства.
- Разъем Luer, исключающий размыкание шприц—игла.
- Отсутствие мертвого пространства гарантирует введение полной дозы без потери лекарства.