

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ЗАО НПО «Гарант»



В. В. Сибирцев

200__ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения:

Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip



Производства:

SFM Hospital Products GmbH, Segelfliegerdamm 67-89, Berlin, Germany / СФМ – Госпитал
Продактс ГмбХ, Германия

2011

ЧЕНИЕ

е изделие медицинского назначения используется в различных областях медицины, также подходит для индивидуального пользования в домашних условиях.

Лейкопластырь используется во вспомогательных целях для фиксации прилегающих повязок и покрытий, применяется для крепления на теле катетеров, иглол с капельницей, зондов, трубок, других медицинских устройств. Также может использоваться для неотложной помощи в случае мелких повреждений, царапин, для защиты места укола после инъекции.

2. ОПИСАНИЕ

Лейкопластырь Бактерицидный SFM-Strip:

Основа телесного цвета имеет хорошие характеристики прочности. Благодаря перфорации отлично пропускает воздух и влагу, не вызывая мацерации кожи, обладает водоотталкивающими свойствами. Прозрачная полимерная микроперфорированная основа пропускает воздух, обладает влагостойкими свойствами, что исключает намокание раны. Лейкопластырь незаметен на коже.

Форма выпуска: индивидуальная упаковка.

Лейкопластырь в наборах:

- Автомобилисту №20:

Основа: перфорированная водостойкая полимерная пленка телесного цвета. Нетканый полиэстр телесного цвета.

Антисептик: хлорид бензалкония.

Характеристика: не прилипает к ране за счет атравматичной подушечки. Полиакрилатный гипоаллергенный клей.

Рекомендации: используется для защиты кожных покровов.

Форма выпуска: набор из 20 индивидуально упакованных пластырей в картонной упаковке (размеры 72 x 19 мм - 10шт., 57 x 19мм - 5шт. на полимерной основе, для пятки - 5шт., для пальца - 5 шт - на нетканой основе).

- Белая ночь №20:

Основа: нетканый полиэстр телесного цвета

Антисептик: хлорид бензалкония

Характеристика: не прилипает к ране за счет атравматической подушечки. Полиакрилатный гипоаллергенный клей. Не сковывает движение мелких суставов кисти

Рекомендации: используется для защиты кожных покровов.

Форма выпуска: набор из 20 индивидуально упакованных пластырей в картонной упаковке (размеры 72 x 19 мм - 10 шт., 57 x 19 мм - 5 шт., 40 x 10 мм - 5 шт.)

Особенности: применим для самой нежной кожи

- В дорогу №20:

Основа: перфорированная водостойкая полимерная пленка телесного цвета. Нетканый полиэстр телесного цвета.

Антисептик: хлорид бензалкония.

Характеристика: не прилипает к ране за счет атравматичной подушечки. Полиакрилатный гипоаллергенный клей.

Рекомендации: используется для защиты кожных покровов.

Форма выпуска: набор из 20 индивидуально упакованных пластырей в картонной упаковке (размеры 72 x 19 мм - 10шт., 57 x 19мм - 5шт. на полимерной основе, для пятки - 5шт., для пальца – 5 шт на нетканой основе).

Особенности: оптимальное сочетание видов и размеров пластырей для различных целей

- Водонепроницаемый №15:

Основа: прозрачная полимерная водонепроницаемая пленка.

Характеристика: не прилипает к ране за счет атравматичной подушечки. Полиакрилатный гипоаллергенный клей.

Назначение: используется для защиты поврежденных кожных покровов от воздействия воды.

Форма выпуска и размеры: набор из 15-ти индивидуально упакованных пластырей в картонной упаковке (размеры 25 мм x 63мм - 10шт., 38 x 38мм - 5шт.)

4

Особенности: малозаметен на коже.

- Водонепроницаемый Детский №10:

Основа: перфорированная цветная водостойкая полимерная пленка.

Антисептик: хлорид бензалкония.

Характеристика: разноцветные пластыри с цветными детскими картинками. Гипоаллергенный клеевой слой. Предназначен для нежной и чувствительной детской кожи. Не прилипает к ране за счет атравматичной подушечки, позволяет коже дышать

Рекомендации: используется для защиты кожных покровов.

Форма выпуска: набор из 10 индивидуально упакованных пластырей 57мм x27мм в картонной упаковке

- для Семьи №25:

Основа: нетканая и полимерная;

Антисептик: хлорид бензалкония;

Характеристика: гипоаллергенный, облегает кожу, воздухопроницаемый – кожа дышит, абсорбирующая неприлипающая подушечка, безболезненно снимается с кожи;

Рекомендации: использовать при порезах, ссадинах, трещинах на коже, желательно менять пластырь ежедневно, особенно при намокших подушечках, хранить в сухом прохладном, защищенном от света месте

Форма выпуска: набор из 25 пластырей (размеры 75x38 мм. – 3 шт., 50x44 мм. – 3 шт. (нетканая основа), 72x19 мм. – 5 шт., 57x19 мм. – 5 шт., 38x38 мм. – 3 шт., 40x10 мм. – 4 шт., диаметр 22 мм. – 2 шт. (полимерная основа) 75x38 мм. – для суставов, 50x44 мм. – для пальцев)

Особенности: универсальный набор «для дома, для семьи»

- Нетканый №15:

Основа: нетканая;

Антисептик: хлорид бензалкония.

Характеристика: гипоаллергенный, облегает кожу, воздухопроницаемый – кожа дышит, абсорбирующая неприлипающая подушечка, безболезненно снимается с кожи;

Рекомендации: использовать при порезах, ссадинах, трещинах на коже, желательно менять пластырь ежедневно, особенно при намокших подушечках, хранить в сухом прохладном, защищенном от света месте, при температуре +20.

Форма выпуска: набор из 15 пластырей (размеры 72x19 мм. – 5 шт., 57x19 мм. – 5 шт., 40x10 мм. – 4шт., диаметр 22 мм. – 1шт.

- Нетканый №25:

Основа: нетканая;

Антисептик: хлорид бензалкония

Характеристика: гипоаллергенный, облегает кожу, воздухопроницаемый – кожа дышит, абсорбирующая неприлипающая подушечка, безболезненно снимается с кожи;

Рекомендации: использовать при порезах, ссадинах, трещинах на коже, желательно менять пластырь ежедневно, особенно при намокших подушечках, хранить в сухом прохладном, защищенном от света месте, при температуре +20.

Форма выпуска: набор из 25 пластырей (размеры 75x38 мм. – 3 шт., 50x44 мм. – 3 шт. (нетканая основа), 72x19 мм. – 5 шт., 57x19 мм. – 5 шт., 38x38 мм. – 3 шт., 40x10 мм. – 4 шт., диаметр 22 мм. – 2 шт. (полимерная основа), 75x38 мм. – для суставов, 50x44 мм. – для пальцев)

- Полимерный №15:

Основа: полимерная;

Антисептик: хлорид бензалкония;

Характеристика: гипоаллергенный, облегает кожу, воздухопроницаемый – кожа дышит, абсорбирующая неприлипающая подушечка, безболезненно снимается с кожи;

Рекомендации: использовать при порезах, ссадинах, трещинах на коже, желательно менять пластырь ежедневно, особенно при намокших подушечках, хранить в сухом прохладном, защищенном от света месте, при температуре +20.

Форма выпуска: набор из 15 пластырей (размеры 72x19 мм. – 5 шт., 57x19 мм. – 5 шт., 40x10 мм. – 4 шт., диаметр 22 мм. – 1 шт.)

- Полимерный №25:

Основа: нетканый полиэстр, перфорированная водостойкая полимерная пленка телесного цвета.

Антисептик: хлорид бензалкония.

Гипоаллергенный, облегает кожу, воздухопроницаемый – кожа дышит, абсорбирующая неприлипающая подушечка, безболезненно снимается с кожи;

Рекомендации: использовать при порезах, ссадинах, трещинах на коже, желательно менять пластырь ежедневно, особенно при намокших подушечках, хранить в сухом прохладном, защищенном от света месте, при температуре +20.

Форма выпуска: набор из 25 пластырей (размеры 75x38 мм. – 3 шт., 50x44 мм. – 3 шт. (нетканая основа), 72x19 мм. – 5 шт., 57x19 мм. – 5 шт., 38x38 мм. – 3 шт., 40x10 мм. – 4 шт., диаметр 22 мм. – 2 шт. (полимерная основа), 75x38 мм. – для суставов, 50x44 мм. – для пальцев)

- Полимерный, для Детей №15:

Основа: полимерная;

Антисептик: хлорид бензалкония;

Характеристика: гипоаллергенный, облегает кожу, воздухопроницаемый – кожа дышит, абсорбирующая неприлипающая подушечка, безболезненно снимается с кожи;

Рекомендации: использовать при порезах, ссадинах, трещинах на коже, желательно менять пластырь ежедневно, особенно при намокших подушечках, хранить в сухом прохладном, защищенном от света месте, при температуре +20.

Форма выпуска: набор из 15 пластырей (размеры 72x19 мм. – 5 шт., 57x19 мм. – 5 шт., 40x10 мм. – 5 шт.)

- Спортсмену №15:

Основа: тканевая, эластичная;

Антисептик: хлорид бензалкония;

Характеристика: гипоаллергенный, облегает кожу, воздухопроницаемый – кожа дышит, абсорбирующая неприлипающая подушечка, безболезненно снимается с кожи;

Рекомендации: используется для защиты кожных покровов.

Форма выпуска: набор из 15 пластырей (размеры 72x19 мм. – 5 шт., 57x19 мм. – 5 шт., 40x10 мм. – 4 шт., диаметр 22 мм. – 1 шт.)

Лейкопластырь на нетканой основе:

Основа: микропористая нетканая целлюлоза.

Клей: гипоаллергенный акриловый клей.

Степень адгезии: хорошая.

Гипоаллергенный лейкопластырь подходит для применения у пациентов как с нормальной, так и с высокой чувствительностью кожи. Может применяться для нежной кожи младенцев и особо чувствительной кожи людей престарелого возраста.

Для пластырей на нетканой основе используется так называемая «медицинская быстро тающая клеевая масса на акриловой основе».

Гипоаллергенный акриловый клей подходит для чувствительной кожи, не вызывая аллергии и раздражения после использования лейкопластыря, хорошо приклеивается и легко распределяется в месте наложения.

Микропористая структура лейкопластыря отлично пропускает воздух и влагу, позволяя коже «дышать» и не вызывая мацерации.

Нетканый материал основы прозрачен для радиолучей.

Возможно нанесение надписей на поверхность пластыря.

Легко отрывается без использования ножниц.

Снимается легко, безболезненно, не оставляя следов клеевой массы на коже.

Размеры лейкопластыря адаптированы для различных участков кожи.

Лейкопластырь (ПОВЯЗКА) Ленточный SFM-Strip:

Основа: перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета.

Впитывающая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой.

Клеевая масса: гипоаллергенный акриловый клей.

Защитная мембрана: силиконовая масляная бумага.

Стерилизация: эпокси-этановым газом.

Лейкопластырь гипоаллергенный, подходит для применения у пациентов как с нормальной, так и с высокой чувствительностью кожи. Для пластыря используется так называемая «медицинская быстро тающая клеевая масса на акриловой основе».

Гипоаллергенный акриловый клей подходит для чувствительной кожи, не вызывая аллергии и раздражения после использования лейкопластыря, хорошо приклеивается и легко распределяется в месте наложения.

Основа имеет хорошие характеристики прочности, эластичности и мягкости, что обеспечивает комфортное использование.

Лейкопластырь не ограничивает свободы движения, и его можно использовать на частях тела со сложным рельефом (колени, подмышечная область, плечо и др.).

Перфорированная структура основы характеризуется высокой воздухо- и паропроницаемостью, позволяя коже вокруг раны «дышать».

Нетканый материал основы прозрачен для радиолучей.

Подушечка в центре пластыря обладает высокой впитывающей способностью. Толщина подушечки подобрана таким образом, чтобы впитать все выделения из раны и защитить ее от дополнительного травмирования. Сторона подушечки, соприкасающаяся с раной, покрыта микросеткой, которая быстро пропускает и распределяет выделения, само покрытие остается сухим и исключает прилипание подушечки к ране.

Защитная мембрана легко снимается, исключает контакт с руками персонала и инструментами. Удобно работать в перчатках.

Снимается легко, безболезненно, не оставляя следов клеевой массы на коже.

Большой выбор размеров лейкопластыря адаптирован для различных участков кожи и позволяет подобрать размер лейкопластыря к величине раны.

Лейкопластырь на полимерной основе SFM Plaster:

Основа: прозрачная микроперфорированная полиэтиленовая пленка.

Клей: гипоаллергенный акриловый клей

Степень адгезии: хорошая

Гипоаллергенный лейкопластырь особенно подходит для применения у пациентов как с нормальной, так и с высокой чувствительностью кожи. Может применяться для нежной кожи младенцев и особо чувствительной кожи людей престарелого возраста.

Для пластырей на полимерной основе используется так называемая «медицинская быстро тающая клеевая масса на акриловой основе». Гипоаллергенный акриловый клей подходит для чувствительной кожи, не вызывая аллергии и раздражения после использования лейкопластыря, хорошо приклеивается и легко распределяется в месте наложения.

Микроперфорированная структура основы отлично пропускает воздух и влагу, не вызывая мацерации кожи, обладает водоотталкивающими свойствами.

Прозрачная основа пластыря дает возможность наблюдать за уровнем жидкости в закрепленных при помощи пластыря трубках и катетерах.

Благодаря отверстиям в пленке легко отрывается без использования ножниц в продольном и поперечном направлениях.

Подходит для длительного ношения. Не вызывает дискомфорта при использовании.

Снимается легко, безболезненно, не оставляя следов клеевой массы на коже.

Размеры лейкопластыря адаптированы для различных участков кожи.

Лейкопластырь на тканевой основе:

Основа: 100% хлопковая ткань.

Клей: оксид цинка и натуральная каучуковая смола.

Степень адгезии: высокая.

Гипоаллергенный лейкопластырь, подходит для применения у пациентов с нормальной чувствительностью кожи.

Присутствие оксида цинка в составе клеевой массы гарантирует минимальный риск возникновения раздражения после использования лейкопластыря.

Специально обработанная хлопковая ткань лейкопластыря отлично пропускает воздух и влагу, позволяя коже «дышать» и не вызывая мацерации. Подходит для длительного ношения. Надежно фиксируется благодаря высокой механической прочности и сильной и чрезвычайно высокой адгезии, но снимается без боли, не травмируя кожу и не оставляя следов клеевой массы на коже.

Размеры лейкопластыря адаптированы для различных участков кожи. Длительный срок хранения.

Лейкопластырь на шелковой основе:

Основа: гипоаллергенный вискозный шелк.

Клей: гипоаллергенный акриловый клей.

Степень адгезии: хорошая.

Форма выпуска и размеры: Катужка в пластиковом пенале.

Гипоаллергенный лейкопластырь подходит для применения у пациентов как с нормальной, так и с высокой чувствительностью кожи. Может применяться для нежной кожи младенцев и особо чувствительной кожи людей престарелого возраста.

Для пластырей на шелковой основе используется так называемая «медицинская быстро тающая клеевая масса на акриловой основе». Гипоаллергенный акриловый клей подходит для чувствительной кожи, не вызывая аллергии и раздражения после использования лейкопластыря, хорошо приклеивается и легко распределяется в месте наложения.

Основа из вискозного шелка характеризуется высокой прочностью (благодаря подвижной структуре ткани), мягкостью. Не растягивается.

Может отрываться без использования ножниц за счет особого плетения основы и зигзагообразного края.

Хорошо пропускает воздух и влагу, не вызывает мацерации кожи, обладает водоотталкивающими свойствами. Подходит для длительного ношения. Надежно фиксируются благодаря высокой механической прочности и хорошей адгезии, но снимается без боли, не травмируя кожу и не оставляя следов клеевой массы на коже.

Размеры лейкопластыря адаптированы для различных участков кожи.

3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Вскрыть картонную коробку с набором пластырей.
- 2) Достать необходимое количество полосок пластыря.
- 3) Освободить полоску пластыря от защитной пергаментной бумаги.
- 4) Не дотрагиваясь руками до бактерицидной подушечки на полоске пластыря, снять поочередно с каждой стороны вошеную защитную прокладку, расположенную на клеевых концах полоски пластыря.
- 5) Расположить пластырь на предварительно продезинфицированной поверхности пореза или раны, поместив бактерицидную подушечку непосредственно на поврежденную поверхность.
- 6) Закрепить клеевые концы полоски пластыря на коже легким разглаживающим движением.

Применяется для всех возрастных групп населения.

Примечание: Перед использованием выдержать при температуре +20 градусов не менее 2-х часов.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок годности 5 лет со дня изготовления, указан на упаковке.

Хранить в сухом прохладном месте. Оберегать от воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей, относительная влажность 80%.

Упаковка удобно вскрывается и содержит всю необходимую информацию о сроках использования изделия, наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, СЕ сертификата, название фирмы, телефон производителя на русском языке, наличие в упаковке инструкции по применению.

В свете прошуровани,
прошуровано и
среднею поавлю
И (сдмшадзатъ)
шестов

Адрес: МОИПО, ГАРАНТ

