




«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ЗАО НПО "ГАРАНТ"

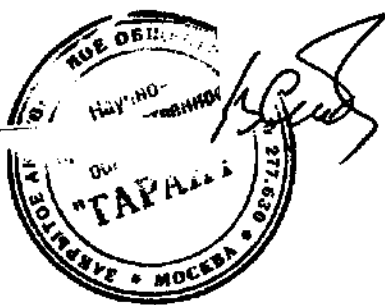

Сибирцев В.В.

200__ г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

**Системы инфузионные и трансфузионные однократного применения SFM с
пластиковой или металлической иглой**

производства SFM HOSPITAL PRODUCTS GMBH, Германия.

Название изделия медицинского назначения:

Системы инфузионные и трансфузионные однократного применения SFM с пластиковой или металлической иглой производства SFM HOSPITAL PRODUCTS GMBH, Германия.

Состав и описание изделия:**Системы инфузионные состоят из:**

- устройства прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром;
- прозрачной камеры;
- длинной гибкой трубы с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания;

Системы трансфузионные состоят из:

- устройства прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром;
- прозрачной камеры;
- цилиндрического фильтра в виде стаканчика для фильтрации как жидкой, так и густой крови;
- длинной гибкой трубы с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания;

Внутренняя система стерильная и апирогенная для одноразового использования; каждая система упакована в стерильный пластиковый пакет

Область применения

Системы инфузионные и трансфузионные однократного применения SFM с пластиковой или металлической иглой предназначены для внутривенного вливания крови, инфузионных растворов и кровезаменителей из стеклянных флаконов или пластиковых контейнеров.

Предупреждение при использовании: Не используйте изделие, если упаковка пакета открыта или повреждена. Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции. Неправильное применение может повлечь за собой травму пациента или его смерть.

Изделие предназначено для одноразового применения. Не использовать повторно. Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия. Это устройство должно использоваться и продаваться только как шприц для инъекций одноразовый.

Внимание: Для снижения уровня риска заражением СПИДом или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.

Противопоказания: Отсутствуют.

Способ применения:

- Закрывать зажим
- Ввести иглу устройства в контейнер
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая ее
- Открыть зажим и выпустить воздух
- Закрывать зажим
- Произвести венопункцию
- Зажимом установить необходимую скорость потока.

Упаковка: полиэтилен

Стерилизация: оксид этилена.

Утилизация: совместно с другими расходными материалами, контактировавшими с кровью, согласно принятого в клинике протокола.

Срок годности: 3 года. Не применять после истечения срока годности!

Хранение.

Хранить изделия в отапливаемых помещениях при температуре от +5° до +40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +25°С.



Инфузионные и Трансфузионные системы

предназначены инфузионные и трансфузионные системы для вливания жидких препаратов, растворов и вливания крови и кровезаменителей

инфузионные системы состоят из:

- устройства прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром;
- прозрачной камеры;
- цилиндрического фильтра в виде стаканчика для фильтрации как жидкой , так и густой крови;
- длинной гибкой трубы с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания;
- внутренняя система стерильная и апиrogenная для одноразового использования; каждая система упакована в стерильный пластиковый пакет

трансфузионные системы состоят из:

- устройства прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром;
- прозрачной камеры;
- длинной гибкой трубой с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего - делать дополнительные инъекции во время вливания;
- внутренняя система стерильная и апиrogenная для одноразового использования; каждая система упакована в стерильный пластиковый пакет