



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор



Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
по ТУ 21.20.24-053-85535470-2018, в вариантах исполнения**

производства ЗАО «Виталфарм»

ВЛТС.939.900-И

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую само и взаимопомощь при травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия или иных чрезвычайных ситуациях.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая рекомендация):

Инструкция
по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

№ п/п	Наименования медицинского изделия	Использование
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2	Перчатки медицинские нестерильные	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4	Жгут кровоостанавливающий	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
8	Лейкопластырь рупонный	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди

Единая служба спасения 112			
Сотовый оператор	Пожарная охрана	Полиция	Скорая помощь
МТС	101	102	103
МЕГАФОН			
БИЛАЙН			
ТЕЛЕ 2			

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Контрэтикетка	1 шт.
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) по ТУ 21.20.24-053-85535470-2018,

в вариантах исполнения:

Наименование	Производитель, страна, номер регистрационного удостоверения	Ед. изм.	Количество
1. Медицинские изделия			
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая		шт.	2
(Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные)	ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908		
или			
(Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010)	ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512		
или			
(Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012)	ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158		
или			
(Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010)	ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707		
или			
(Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010)	ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436		
или			
(Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов)	Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740		
или			
(Маска медицинская нестерильная	ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН		

ВЛТС.939.900-И

одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см х 14,0 см; 9,5 см х 14,5 см; 9,5 см х 17,5 см) или (Одежда медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе) или (Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020) или (Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017) или (Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010)	2016/4118 ООО "Фарм-Глобал", Россия, РУ РЗН 2018/6739 ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944 ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773 ООО "КИТ", Россия, РУ ФСР 2010/09673		
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М (Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные) или (Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY») или (Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые) или (Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные) или (Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe) или (Перчатки медицинские нестерильные и стерильные) или (Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные) или (Перчатки диагностические медицинские SF Gloves различных типоразмеров)	Топ Глав СднБхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130 Топ Глав СднБхд, Малайзия, РУ РЗН 2017/5747 Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД., Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932 Хелиомед Хандельсгез м.б.Х., Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144 ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102 «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07368 «Райзен (Тяньзинь) Хэлфкэа Продактс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2012/13220 «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07717	пара	2

ВЛТС.939.900-И

или (Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Benouy" стерильные и нестерильные) или (Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM®) или (Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matorat) или (Перчатки медицинские) или (Перчатки смотровые виниловые нестерильные одноразовые следующих типоразмеров: XS, S, M, L, XL) или (Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Vi- Safe)	«ТГ Медикал Сдн. Бхд.», Малайзия, РУ ФСЗ 2012/12488 "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, РУ РЗН 2019/8284 "ТЗМО С.А.", Польша, РУ ФСЗ 2007/00788 «Тан Син Лян Индастриз Сдн. Бхд.», Малайзия, РУ ФСЗ 2012/13037 «Суцянъ Грин Глоув Компани Лимитед», Китай, РУ РЗН 2014/1985 "ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани", Вьетнам, РУ РЗН 2017/6105		
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот- Устройство-Рот» (Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012 в следующих исполнениях: воздуховоды полимерные №1, №2; воздуховоды полимерные №1, №4; воздуховоды полимерные №2, №3, воздуховоды полимерные №3, №4; воздуховоды полимерные стерильные №1, №2, №3, №4) или (Устройство для проведения искусственного дыхания – «рот- устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009- 26528997) или	ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ ФСР 2011/10719 ООО НПФ «МИРАЛ», Россия, РУ ФСР 2010/07434	шт.	1

ВЛТС.939.900-И

(Устройство для проведения искусственного дыхания – «Рот – Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017	ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2018/6705		
1.4 Жгут кровоостанавливающий		шт.	1
(Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» в составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; - Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; - Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот») или (Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией) или (Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм»)	ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466 ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432 ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733		
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см		шт.	4
(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см.) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) * или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93)	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317		

ВЛТС.939.900-И

или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005- 10715071-2014) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004- 10715071-2014)	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558		
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93) (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93) или (Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93) или	ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070 ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341 АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/06612 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317 ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650	шт.	3

ВЛТС.939.900-И

(Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014) или (Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014)	ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558		
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 см х 14 см №10 (Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93) или (Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93. Следующих типоразмеров: 16см х 14см; 45см х 29см; 70см х 68см) или (Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93) или (Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93) или (Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93) или (Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93) или (Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93)	ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03225 ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2553 ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03789 ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01316 ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ ФСР 2011/11141 ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12069 ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649	уп.	2
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см х 500 см Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip или Лейкопластырь медицинский фиксирующий или Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах или Лейкопластыри медицинские	«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442 «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252 ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017 «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,	шт.	1

ВЛТС.939.900-И

фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед» или Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009 или Лейкопластырь медицинский фиксирующий или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019 или Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017 или Пластырь медицинский стерильный и нестерильный, разных форм и размеров: - на тканевой основе, - на нетканой основе, - на полимерной основе.	Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363 «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593 АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212 ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2007/00548		
2. Прочие средства			
2.1 Ножницы (Ножницы тупоконечные 130) или (Ножницы бытовые 120) или (Ножницы тупоконечные 10 см) или (Ножницы марки «Лейко»)	YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию «YIWU WENYA STATIONARY FACTORY», Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию YIWU PENGHAO STATIONERY CO., LTD, Китай Не подлежит обязательной сертификации и декларированию ООО «Лейко», Россия Не подлежит обязательной сертификации и декларированию	шт.	1
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)		шт.	1
2.3 Футляр	ВЛТС.939.900-01 или ВЛТС.939.900-02	шт.	1

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Футляр жесткий:

– Длина, мм - 225±55

ВЛТС.939.900-И

- Ширина, мм - 180 ± 35
- Высота, глубина, мм - 75 ± 20

Футляр мягкий:

- Длина, мм - 215 ± 40
- Ширина, мм - 155 ± 30
- Высота, глубина, мм - 95 ± 20

Масса пустого футляра должна соответствовать, г:

Футляр жесткий: 200 ± 70

Футляр мягкий: 75 ± 20

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

Футляр мягкий – ткань, 100% полиэстер, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOU YWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1.;

или

Футляр жесткий:

- полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

или

- полистирол ПСМ-115 по ГОСТ 20282-86.

- Марки красителей из каталога RAL: КПО-12, КПО-23, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, ПФ1503/07-ПЭ, КПО-01.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в

ВЛТС.939.900-И

соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

4 года с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д. 2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

_____ листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

_____ Андросов В.

