

**Общество с ограниченной ответственностью
«КАШИНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ»**

ОКПД2 14.12.30.190

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КАШИНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ»



Головлев М.Г.
«19» марта 2021 г.

Инструкция по применению

**«Костюм медицинский изолирующий одноразовый нестерильный
из нетканого материала на основе модифицированного льна по ТУ
14.12.30-010-15921148-2020 в вариантах исполнения серия 01,
серия 02»**

ООО «Кашинский льнокомбинат»

1. Наименование медицинского изделия:

«Костюм медицинский изолирующий одноразовый нестерильный из нетканого материала на основе модифицированного льна по ТУ 14.12.30-010-15921148-2020 в вариантах исполнения серия 01, серия 02»:

1. Костюм медицинский изолирующий одноразовый нестерильный из нетканого материала на основе модифицированного льна, по ТУ 14.12.30-010-15921148-2020 вариант исполнения КМБ-1, серия 01, 20000 шт., в составе:

Костюм медицинский КМ-1 размер S, M, L, XL, XXL, XXXL – 1 шт.;

- Бахилы БМ-1, размер 25 (для размера костюма S, M, L) - 2 шт.

- Бахилы БМ-1 размер 32 (для размера костюма: XL, XXL, XXXL) - 2 шт.

- Инструкция по применению.

2. Костюм медицинский изолирующий одноразовый нестерильный из нетканого материала на основе модифицированного льна, по ТУ 14.12.30-010-15921148-2020 вариант исполнения КМ-1, серия 01, 5000 шт., в составе:

Костюм медицинский КМ-1 размер S, M, L, XL, XXL, XXXL – 1 шт.;

- Инструкция по применению.

3. Костюм медицинский изолирующий одноразовый нестерильный из нетканого материала на основе модифицированного льна, по ТУ 14.12.30-010-15921148-2020 вариант исполнения КБ-1 серия 01, 15000 шт., в составе:

Костюм медицинский К-1, размер S, M, L, XL, XXL, XXXL – 1 шт.;

- Бахилы Б-1, размер 25 (для размера костюма S, M, L) - 2 шт.

- Бахилы Б-1 размер 32 (для размера костюма: XL, XXL, XXXL) - 2 шт.

- Инструкция по применению.

4. Костюм медицинский изолирующий одноразовый нестерильный из нетканого материала на основе модифицированного льна, по ТУ 14.12.30-010-15921148-2020 вариант исполнения К-1, серия 01, 5000 шт., в составе:

- Костюм медицинский К-1 размер S, M, L, XL, XXL, XXXL – 1 шт.;

- Инструкция по применению.

5. Костюм медицинский изолирующий одноразовый нестерильный из нетканого материала на основе модифицированного льна, по ТУ 14.12.30-010-15921148-2020 вариант исполнения КБ-2, серия 02, 2500 шт., в составе:

Костюм медицинский К-2 размер S, M, L, XL, XXL, XXXL – 1 шт.;

- Бахилы Б-2, размер 25 (для размера костюма S, M, L) - 2 шт.

- Бахилы Б-2, размер 32 (для размера костюма: XL, XXL, XXXL) - 2 шт.

- Инструкция по применению.

6. Костюм медицинский изолирующий одноразовый нестерильный из нетканого материала на основе модифицированного льна, по ТУ 14.12.30-010-15921148-2020 вариант исполнения К-2, серия 02, 2500 шт., в составе:

- Костюм медицинский К-2 размер S, M, L, XL, XXL, XXXL – 1 шт.;

- Инструкция по применению.

2. Производитель:

ООО «КАШИНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ» (сокращенное название ООО «КЛК»)

ИНН 6909010688 / КПП 690901001 / ОГРН 1176952009948

Юридический адрес/почтовый адрес:

171640, РФ, Тверская область, Кашинский р-н, г. Кашин, территория льнозавода д.2а.

Тел. по Тверской области : +7(4822)73-51-01, для регионов : 8-800-707-30-52,

e-mail: info@oooklk.ru, вебсайт : www.oooklk.ru

3. Показания:

Костюм медицинский предназначен для использования в качестве барьерного средства в целях предупреждения внешнего инфицирования человека.

4. Противопоказания.

Возможно возникновение аллергической реакции при наличии индивидуальной непереносимости компонентов изготовления Костюма медицинского. В случае возникновения раздражающей реакции следует прекратить использование изделия.

5. Назначение: Костюм медицинский предназначен для индивидуальной защиты в условиях возможного заражения возбудителями особо опасных микробных и вирусных инфекций.

6. Потенциальный потребитель:

Костюм медицинский используется медицинским персоналом в стационарных и лабораторных ЛПУ для предупреждения внешнего инфицирования медицинского персонала при выполнении противоэпидемических мероприятий и дезинфекционных работ.

7. Сведения о программном обеспечении

Не применимо

8. Сведения об ЭМС

Не применимо

9. Технические характеристики медицинского изделия.

Костюмы медицинские с герметично проклеенными швами в вариантах исполнения КМБ-1, КМ-1, КБ-1, К-1 соответствуют I группе защиты по ГОСТ 12.4.175. Костюмы медицинские без проклейки швов в вариантах исполнения КБ-2, К-2 соответствуют II группе защиты по ГОСТ 12.4.175.

Климатическое исполнение изделий – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

В соответствии с ГОСТ 31508 и требованиями Приказа Минздрава России № 4н от 06.06.2012 г. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» Костюм медицинский относится к классу 1 степени риска.

Технические характеристики изделия:

Костюмы медицинские изолирующие одноразовые нестерильные из нетканого материала на основе модифицированного льна выпускаются в вариантах исполнения и комплектации представленных в таблице 1.

Таблица 1

Варианты исполнения и комплектации

Вариант исполнения, кодировка	Основной материал	Комплектация и маркировка составных частей	Группа по ГОСТ 12.4.175
Костюм КМБ-1	MEDFLAXMEM, швы проклеены	Костюм КМ-1, бахилы БМ-1	I группа по ГОСТ 12.4.175
Костюм КМ-1	MEDFLAXMEM, швы проклеены	Костюм КМ-1	I группа по ГОСТ 12.4.175

Костюм КБ-1	MEDFLAX, швы проклеены	Костюм К-1, бахилы К-1	I группа по ГОСТ 12.4.175
Костюм К-1	MEDFLAX, швы проклеены	Костюм К-1	I группа по ГОСТ 12.4.175
Костюм КБ-2	MEDFLAX	Костюм К-2, бахилы Б-2	II группа по ГОСТ 12.4.175
Костюм К-2	MEDFLAX	Костюм К-2	II группа по ГОСТ 12.4.175

- во всех вариантах исполнения каждое изделие упаковывается в индивидуальный пакет с малой маркировочной этикеткой. В групповую картонную коробку вкладывается одна общая инструкция по применению.

- в вариантах исполнения КМБ-1 (материал с мембраной, швы проклеены, комплектуются костюм и бахилы) и КМ-1 (материал с мембраной, швы проклеены, комплектуется только костюм) – в индивидуальную упаковку дополнительно вкладывается большая этикетка с полной информацией и штрих-кодом, на обратной стороне которой размещена инструкция по применению.

Костюмы медицинские изготавливаются одного типа универсального назначения (для мужчин и для женщин). Костюмы медицинские изготавливаются в 6-ти размерах. Бахилы – в 2-х размерах. Размеры костюма и бахил соответствуют размерам типовых фигур, представлены в таблице 2. Параметры типовых размеров фигуры и ноги представлены в сантиметрах.

Таблица 2.

Таблица размеров

№	1	2	3	4	5	6
Размер	44	46	48-50	50-52	52-54	56-58
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Рост	155-170	160-176	165-180	170-186	170-190	180-200
Длина изделия	160	164	168	174	176	184
Обхват груди/талии	84-98	86-98	94-102	98-110	108-120	110-130
Размер груди изделия	120	125	130	135	140	145
Длина рукава	84	86	90	93	96	99
Ширина рукава	18	18	22	22	24	24
Размер бахила	25	25	25	32	32	32


Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Костюм медицинский с молнией, закрытой планкой. Рукав длинный, манжет которого собран на эластичную тесьму/резинку. Нижняя часть брюк так же собрана на эластичную тесьму/резинку. Регулировка объема талии должна обеспечиваться с помощью эластичной тесьмы/резинки. Край капюшона (лицевой вырез) собран на резинку. Швы изделия могут быть проклеены герметичной лентой.

Бахилы – высокий носок с дополнительным слоем материала в зоне подошвы. Верх голенища собран на эластичную тесьму/резинку. На уровне щиколотки находится фиксирующая тесьма/резинка. Швы изделия могут быть проклеены герметичной лентой.

«Костюм медицинский изолирующий одноразовый не стерильный из нетканого материала на основе модифицированного льна.»

Вид спереди

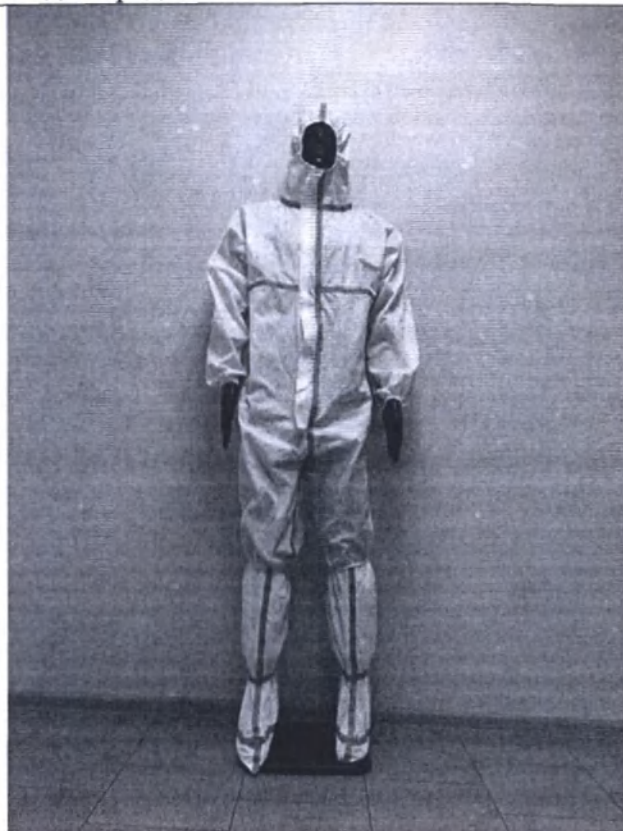

Вид сзади

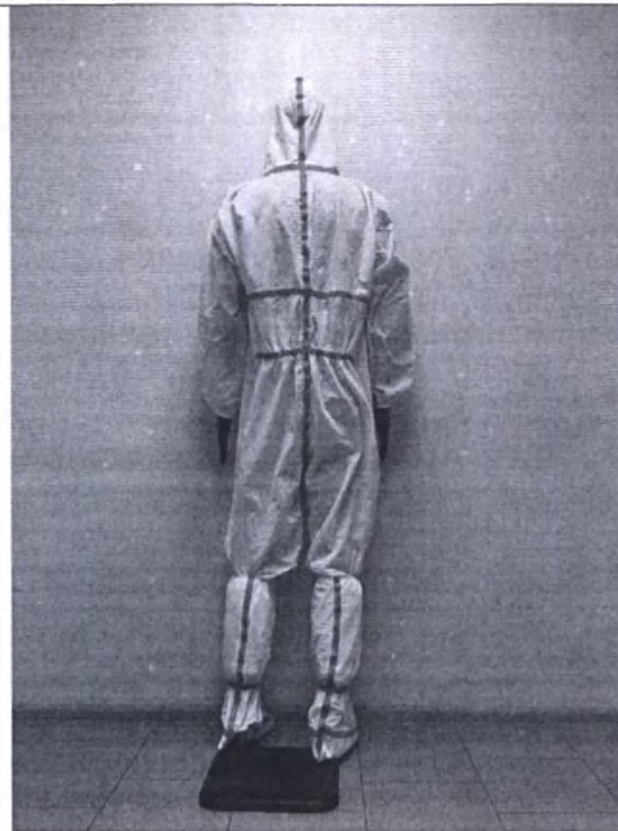


Рисунок 1. Внешний вид изделия «Костюм медицинский»

В готовых изделиях допускаются:

- небольшая морщинистость на криволинейных участках швов;

В готовых изделиях не допускаются:

- сквозные повреждения, потертости и сдиры покрытия материала;
- не прошитые (не проваренные) участки швов;
- не расправляемые складки.

Для изготовления Костюмов медицинских используют:

- нетканый материал на основе модифицированного льна медфлекс с мембранным полиуретановым покрытием (MEDFLAXMEM, сокращено MFM) поверхностной плотностью не менее 75 г/м². Внутренний льняной слой состоит из модифицированного льняного волокна (50-80%) и вискозного волокна (20-50%).
- нетканый материал на основе модифицированного льна медфлекс (MEDFLAX, сокращено MF) с поверхностной плотностью не менее 59 г/м². Нетканый материал состоит из модифицированного льняного волокна (50-80%) и вискозного волокна (20-50%).

10. Содержание материалов животного и человеческого происхождения

Отсутствует.

11. Маркировка

Символ	Расшифровка
	Изготовитель МИ
	Дата изготовления
	Использовать до
	Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	Не использовать при повреждении упаковки
	Беречь от влаги
	Температурного диапазона
	Диапазон влажности
	Нестерильно
	Не подлежит повторному использованию
	Не стирать
	Нельзя гладить
	Нельзя выжимать и сушить в машине
	Химчистка не разрешена
	Огнеопасно
	Прочитайте инструкцию

12. Материалы

№ п.п.	Наименование изделия	Материалы	Производитель
1	Нетканый материал на основе модифицированного льна MEDFLAX	Модифицированный лен медицинский 50%, вискоза 50%	«Changshu Feilong Non woven Co», Китай
2	Мембрана	Полиуретан эластомер 100% , Бренд:SZYY Модель: ATMP151600 / ATHP151600	"NINGBO BOSEN IMP& EXP CO.,LTD" Китай
3	Клей RUP	Полиуретан 100%, Бренд: Aiteyou, Модель: RUR-705	"NINGBO BOSEN IMP& EXP CO.,LTD" Китай
4	Молния	Цинковый сплав 30%, полиэстер 70%, Бренд: Hongheng, Модель: Nylon 5#	"NINGBO BOSEN IMP& EXP CO.,LTD" Китай
5	Защитная клеящая лента для швов синяя	Полиэтилен 50%, этил-винил-ацетат 50%. Бренд: Kelibao, Модель:A4	"NINGBO BOSEN IMP& EXP CO.,LTD" Китай
6	Нитки п/э 40/2 4570м	Полиэстер 100%, Бренд:Fengbo , Модель: FB-402	"ХУАМЭЙ ФРЕД КАМПАНИ ЛИМИТЕД" Китай
7	Нитки армированные п/э 45лл 2500м	Полиэстер 100%	ОАО "Прядильно-ниточный комбинат им.С.М. Кирова
8	Лента Эластичная продержечная 6мм-10мм, 50м	Полиэстер51,5%, латекс 48,8% ОСТ 1710883-93	ОАО "Лента" Белоруссия
9	Тесьма эластичная (резинка) 6/8мм	Полиэстер50%, Латекс50%, Модель: BSD-06, Бренд: Baishide	NINGBO BOSEN IMP& EXP CO.,LTD" Китай
10	Скотч клейкая лента двусторонняя прозрачная (15/20мм)	Этил-винил-ацетат 100%, Модель: DS11, Бренд: Huangguan	BERLINGO, Китай
11	Пакеты потребительской упаковки	Полимерная пленка 100% ГОСТ 12302-2013	ООО "ИНТЕРПАК"

12	Пакеты потребительской упаковки	Полимерная пленка 100% ГОСТ 12302- 2013	ООО "ЕВРО ПАК" Иваново
13	Коробки гофра групповой упаковки	Картон 100% ГОСТ 9142-2014	ОАО "Универсальные технологии упаковки"

13. Способ применения

- 1) Проверьте срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности Костюм медицинский непригоден к применению.
- 2) Не допускается использование Костюма медицинского при наличии механических повреждений.
- 3) Костюм медицинский одноразового применения.
- 4) Для полной экипировки рекомендуется использовать респиратор (маска лицевая), защитные очки, бахилы, перчатки.

Правила использования костюмов

Для обеспечения комфорта и максимальной безопасности при работе в стационарных и лабораторных ЛПУ, Костюмы медицинские представлены в широкой размерной гамме. Для комфорта движений предусмотрен свободный крой. Значения размеров сделаны на основании замеров человека в нижнем белье, но без обуви. Пожалуйста, выбирайте Костюм медицинский в соответствии актуальным размерам, а не по размерам своей повседневной одежды!

Костюмы медицинские предназначены только для одноразового использования и не предназначены для стирки.

Изделие надевается поверх одежды.

В случае возникновения аллергической реакции необходимо немедленно прекратить использование.


Надевание Костюма медицинского:

- Изделие надевается поверх одежды.
- Перед тем как надеть, проверьте костюм медицинский на отсутствие повреждений
- Снимите ювелирные украшения и часы
- Наденьте костюм и застегните его до пояса
- Наденьте обувь
- Наденьте бахилы
- Наденьте защитную полумаску и проверьте прилегание
- Наденьте защитные очки
- Наденьте рукава, капюшон и застегните молнию до конца. Для закрытия подбородка и молнии застегните «липучку»
- Наденьте защитные перчатки поверх манжет рукавов



Снятие Костюма медицинского:

- Дезинфицируйте защитные перчатки и костюм при необходимости.
- Снимите бахилы (при наличии)
- Снимите капюшон и стягивайте костюм до пояса, выворачивая его наизнанку. Одновременно вынимайте руки из рукавов (возможна помощь другого человека с защитными перчатками и в защитной полумаске)
- Снимите полностью костюм вместе с обувью
- Снимите защитные перчатки вывернув их наизнанку
- Снимите защитные очки за концы дужек
- Снимите защитную полумаску за эластичные резинки
- Проведите дезинфекцию рук, лица с помощью дезинфицирующего лосьона и смойте водой.

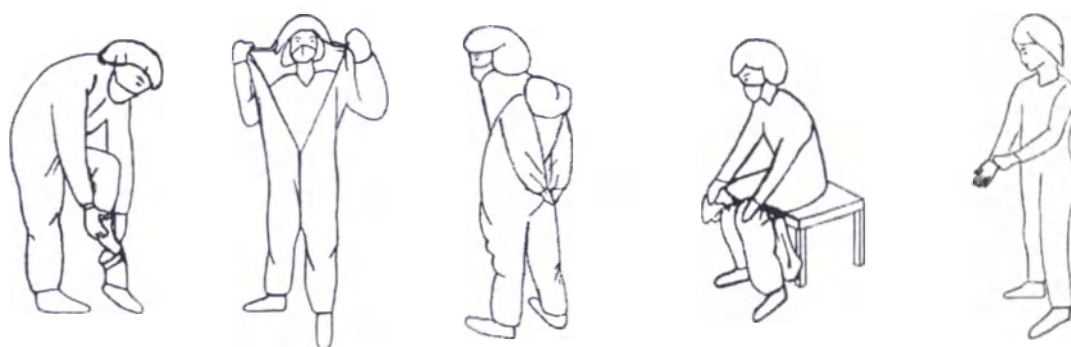

Для правильного выбора варианта исполнения Костюма медицинского от биологической угрозы важно, чтобы сотрудник, ответственный за безопасность, проверил и протестировал изделия. При неправильном выборе варианта исполнения Костюма медицинского микробы и вирусные инфекции могут причинить значительный вред здоровью человека. По этой причине выбор должен проводиться с особой тщательностью.

Сфера применения:

Костюм медицинский используется медицинским персоналом в стационарных и лабораторных ЛПУ для индивидуальной защиты в условиях возможного заражения возбудителями особо опасных микробных и вирусных инфекций. Изделия надеваются поверх одежды.

Для достижения заявленной защиты необходимо использовать маску с соответствующим условиям воздействия фильтром и плотно прилегающий к ней капюшон, дополнительно герметизировать капюшон, а также манжеты рукавов и штанин при помощи клейкой ленты. При использовании клейкой ленты позаботьтесь о том, чтобы ни на материале, ни на ленте не образовывались складки, так как через них могут проникать различные микробы и вирусы. Для герметизации капюшона клейкой лентой используйте короткие отрезки (около 10 см) и наклеивайте их внахлест.

Костюмы медицинские могут использоваться с перчатками. При этом вторую пару перчаток следует надевать поверх рукавов костюма. Для максимальной защиты необходимо примотать клейкой лентой внешнюю перчатку к рукаву на стыке.

Материалы, используемые для изготовления Костюмов медицинских, прошли все испытания по ГОСТ 31508-2012, ГОСТ 12.4.175-88, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-10-2011. Специальные требования к Костюмам медицинским, используемым для защиты от инфекций, гарантируют защиту кожи человека от потенциального контакта с биологическими веществами, что помогает предотвратить распространение микробов и вирусов. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что материал MEDFLAX и MEDFLAXMEM обеспечивает барьерную защиту от возбудителей инфекций. Испытания проводились в соответствии со стандартом ГОСТ 12.4.136-84.

Ограничения по применению:

Костюмы данного типа и (или) материал не являются огнестойкими и не должны использоваться вблизи источника тепла, открытого огня, искр или в среде, где существует риск воспламенения.

Нахождение в условиях биологического риска, не соответствующего уровню непроницаемости Костюма медицинского, может привести к биологическому загрязнению пользователя. В случае присутствия в среде частиц очень малых размеров, интенсивного распыления может возникнуть необходимость применения костюмов более высокой степени механической прочности или барьерной защиты, чем у предлагаемых моделей.

Необходимо обеспечить надлежащее заземление Костюма медицинского и носящего его сотрудника. Параметры рассеивания электростатического заряда Костюма медицинского и пользователя должны поддерживаться на таком уровне, чтобы сопротивление между пользователем, носящим костюм, и землей не превышало 10^8 Ом. Для этого пользователь может надеть соответствующую обувь, а также может применяться специальное напольное покрытие, кабель заземления и другие подходящие средства. Запрещено использовать Костюмы медицинские при наличии в среде легко воспламеняемых или взрывоопасных веществ. Не допускается использование Костюмов медицинских в насыщенной кислородом среде без предварительного согласования с инженером по технике безопасности.

13.Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 12.4.175-88	Одежда специальная защитная. Нормы проницаемости микроорганизмов.
ГОСТ 12.4.136-84	Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости микроорганизмами.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.

ГОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.
ГОСТ 12088-77	Материалы текстильные и изделия из них. Методы определения воздухопроницаемости.
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 4103-82	Швейные изделия. Методы контроля качества
ГОСТ 28965-91	Застежка молния. Методы контроля
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 34033-2016	Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 18321-73	Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.
ГОСТ 3813-72	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.
ГОСТ 25706-83	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.
ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная. Технические условия
Приказ Минздрава №4н от 06.06.2012	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.7.279-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
ТУ 13.9-001-15921148-2020	«Нетканый материал на основе модифицированного льна»
ТУ 25-1894.003-90	Секундомеры механические. Технические условия.
ГОСТ 12.1.003-2014	Шум. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.002-2014	Процессы производственные. Общие требования безопасности
СП 2.2.2.1327	Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту
СанПиН 2.1.6.1032-01	Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему

	инструменту
ГОСТ Р 58 577–2019	Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов.
СП 2.2.2.1327	Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту
СанПиН 2.1.6.1032-01	Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.

14. Условия стерилизации.

Костюмы медицинские выпускают нестерильными, и являются одноразовыми в применении.

15. Условия эксплуатации:

- температура: от минус 5 °С до 35 °С;
- влажность: 70 % при 15°С.

16. Порядок использования медицинского изделия.

Надевание Костюма медицинского не требует владения специальными техниками.

ВАЖНО! Не используйте вторично одноразовый Костюм медицинский. Выбросите использованный Костюм медицинский в отходы.

Перед началом необходимо эксплуатации провести осмотр на предмет повреждений. В случае выявления дефектов (что маловероятно) не используйте Костюм медицинский.

Длительность одного использования не более 24 часов.

17. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

Костюм является одноразовым медицинским изделием, ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.

18. Упаковка.

Упакованные в индивидуальные пакеты Костюмы медицинские укладывают в транспортную упаковку (коробку из гофрированного картона) по ГОСТ 9142 в количестве, кратном 5 шт.

19. Транспортирование и хранение.

Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

Хранение Костюмов медицинских должно осуществляться в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.

Костюмы медицинские могут храниться при температуре рекомендованной производителем материала в сухом, темном месте (например, картонной коробке), защищенном от прямых солнечных лучей, ультрафиолетового воздействия, атмосферных осадков, влаги, механических повреждений и агрессивных сред.

Транспортировка и хранение изделий должны осуществляться в оригинальной упаковке.

20. Срок годности:

Гарантийный срок годности – 3 года с даты производства.

21. Сведения об утилизации.

Использованный по назначению Костюм медицинский утилизируется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 для медицинских отходов класса Б.

Костюм медицинский, не использованный по назначению, а также с истекшим сроком годности и/или с поврежденной упаковкой, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 для медицинских отходов класса А.

Костюмы медицинские могут быть утилизированы путем сжигания или захоронения на контролируемых полигонах без ущерба для окружающей среды. Утилизация зараженных медицинских изделий регулируется национальным или местным законодательством.

22. Контактная информация.

ООО «КАШИНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ» (сокращенное название ООО «КЛК»)

ИНН 6909010688 / КПП 690901001 / ОГРН 1176952009948

Юридический адрес/почтовый адрес:

171640, РФ, Тверская область, Кашинский р-н, г. Кашин, территория льнозавода д.2а тел.

По Тверской области : +7(4822)73-51-01 для регионов : 8-800-707-30-52,

email : info@oooklk.ru , вебсайт : www.oooklk.ru

Уточнение

Человек сам несет ответственность за выбор варианта исполнения Костюма медицинского для конкретной ситуации.

Компания ООО «Кашинский льнокомбинат» ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за неправильное применение и использование Костюмов медицинских.



Прошито и пронумеровано

14 лист 06

Ген.директор

Головнев М. П.

