



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ»
/Д.В.Лавров/

М.п.

2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

Ингалятор-баллончик медицинский с газовой кислородной смесью «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» для индивидуальной кислородной терапии по ТУ 32.50.50.190-001-0124642608-2018.

Назначение

Ингалятор-баллончик медицинский с газовой кислородной смесью «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» для индивидуальной кислородной терапии предназначен для кратковременной подачи газовой кислородной смеси с целью обогащения кислородом вдыхаемого воздуха при недостатке кислорода.

Кислород повышает иммунитет, активизирует обмен веществ, нормализует сон. Баллончик с газовой кислородной смесью является наиболее простым и безопасным средством борьбы с кислородным голоданием – гипоксией.

Показания к применению

Взрослым для профилактики гипоксии различного происхождения. Для проведения оксигенотерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, аллергии, астме, нарушении сна, ослабленном иммунитете, физическом и умственном перенапряжении.

Дополнительный источник кислорода может потребоваться при отравлении веществами с удушающим эффектом, при ослабленном дыхании, в целях дегельминтизации, привегетососудистой дистонии, синдроме хронической усталости, стрессе, ожирении.

Кислород в баллонах используют и относительно здоровые люди, проживающие в неблагоприятных экологических условиях и испытывающие нехватку воздуха. Предназначен для жителей больших городов, в которых значительно снижено количество кислорода в атмосфере; автолюбителям, проводящим много времени в пробках, в условиях сильной загазованности и закрытом пространстве автомобиля; спортсменам, в качестве активного восстановителя сил после повышенных физических нагрузок; людям, испытывающим повышенные умственные и эмоциональные нагрузки; сотрудникам офисов, работающим в закрытых помещениях.

Описание и основные технические характеристики

Ингалятор «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» - это аэрозольный баллончик с насадкой-распылителем и защитным колпачком, наполненный кислородно-газовой смесью без запаха и вкуса.

Состав газовой смеси:

Кислород 90%

Азот 10% (62,5 мг)

Содержимое баллончика высвобождается за счет нажатия на головку насадки-распылителя. Кислородно-газовая смесь поступает в головку распылителя, откуда производится ингаляция.

Баллончики одноразовые, повторному заполнению не подлежат.

Кислородно-газовая смесь не является лекарством.

Не содержит ароматических веществ и консервантов

Ингалятор «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» представлен в трех вариантах исполнения: без маски, с мягкой маской, с жесткой маской.

Объем кислорода для каждого варианта исполнения - 9, 13 или 17 литров.

Как пользоваться ингалятором –баллончиком.

Использование Ингалятора без маски:

1. Снимите защитную пленку с ингалятора.
2. Снимите защитный колпачок с баллончика.
3. Поднесите баллончик ко рту на расстоянии 0-10 см.
4. Сделайте выдох.
5. Нажмите на насадку-распылитель и одновременно сделайте глубокий вдох.
6. Задержите дыхание на 2-3 секунды.
7. Сделайте выдох.




Использование Ингалятора с мягкой маской:

1. Снимите защитную пленку с ингалятора.
2. Снимите защитный колпачок с баллончика.
3. Наденьте соединительную трубку маски на насадку-распылитель баллончика.
4. Сделайте выдох и приложите маску к лицу на область носа и рта.
5. Нажмите на насадку-распылитель и одновременно сделайте глубокий вдох.
6. Задержите дыхание на 2-3 секунды.
7. Сделайте выдох.



Использование Ингалятора с жесткой маской:

1. Снимите защитную пленку с ингалятора.
2. Снимите защитный колпачок с жесткой маски (колпака).
3. Снимите жесткую маску (колпак) с баллончика.
4. Соедините маску с «носиком» насадки-распылителя.
5. Сделайте выдох и приложите маску к лицу на область носа и рта.
6. Нажмите на насадку-распылитель и одновременно сделайте глубокий вдох.
7. Задержите дыхание на 2-3 секунды.
8. Сделайте выдох.

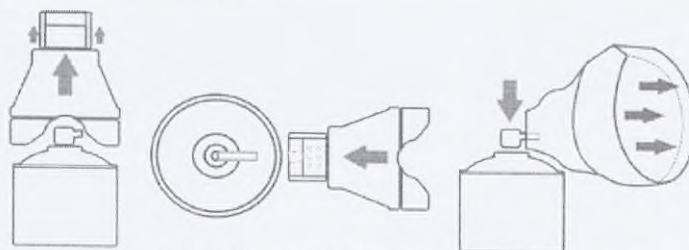

Рекомендации по применению. Профилактическая доза 3-5 вдохов утром и вечером. При большем количестве вдохов делают перерывы по 5-10 минут между сеансами. В случае применения в условиях лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждений применять по рекомендации врача.

Для индивидуального использования лучше подходит ингалятор-баллончик с маской мягкой или жесткой маской. Для использования несколькими людьми лучше подходит ингалятор-баллончик

без маски. Перед использованием ингалятора-баллончика «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» необходимо проконсультироваться с врачом. Применение газовой кислородной смеси беременным возможно только по назначению врача.

Противопоказания к применению.

Противопоказано применение ингалятора-баллончика при ОРВИ, эпилепсии, при нарушениях проходимости пазух носа и слуховых труб, при наличии полостей в легких. Использование ограничивается и при заболеваниях органов ЖКТ: язва, опухоли, воспалительные процессы. Оксигенотерапия запрещена беременным женщинам в третьем триместре.

Меры предосторожности: Баллон находится под давлением. Не взрывать, не деформировать, не сжигать, не вскрывать даже после использования, не распылять вблизи открытого огня, не допускать контакта с нефтепродуктами и маслами. Огнеопасно. Маслоопасно.

Условия хранения. Хранить при температуре от 5° до 30°, избегая попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C, в недоступном для детей месте, при относительной влажности не более 60%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м.

Условия транспортирования. Ингаляторы в транспортной упаковке при транспортировании должны выдерживать воздействие температуры от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 80 %. После транспортирования в условиях отрицательных температур Ингалятор должен быть выдержан в транспортной таре в нормальных климатических условиях не менее 12 ч.

Срок годности. Гарантийный срок хранения продукта 18 месяцев со дня изготовления.

Условия отпуска. Без рецепта.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует соответствие требованиям ТУ 32.50.50.190-001-0124642608-2018 на весь период эксплуатации и в течение гарантийного срока хранения при условии выполнения требований по хранению и транспортированию данного медицинского изделия.

Рекомендации по утилизации.

Газовая кислородная смесь не опасна для окружающей среды; обезвреживание и ликвидация не требуется. Остатки сбрасываются в атмосферу рассеиванием.

Баллончик не представляет никакой биологической, химической, радиационной или любой другой опасности, допускается утилизация в качестве бытовых отходов или в качестве металлолома на утилизацию в специализированные организации.

Производитель:

ООО «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Геологов д.6, пом. III, комн. 3.

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Геологов д.6, пом. III, комн. 3; www.o2-element.ru, info@o2-element.ru, +7(499)350-96-16

Владелец регистрационного удостоверения.

ООО «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Геологов д.6, пом. III, комн. 3.

Всего пронумеровано и скреплено

3 (три)

листок

[Handwritten signature]

