



ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА



ТЕМНО-РОЗОВЫЙ



ТУ 9398-093-11764404-2012

ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

УКП-Винар-ИХ-П134/7-ПО

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПОРИСТОЕ
С ХИМИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ КЛАССА 6 ПО ГОСТ Р ИСО 11140-1
РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ: 134^{±3} °C, 7^{±1} мин




УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОЕ ПОРИСТОЕ ОДНОРАЗОВОЕ «УКП-Винар-ИХ-П-ПО»

2012 ИП
устройства контроля процесса (далее - Устройство) одноразовые «УКП-Винар-ИХ-П-ПО» (далее - «ИХ-П5-ПО», «ИХ-П121/20-ПО».

аналогами индикаторной системы «Тест-ИХ»
соответствии с ТУ 9398-093-11764404-2012.

бой стопку бумаги с химическим индикатором, уложенной в стопку (картоном). В качестве химического индикатора используется бумага с химическим индикатором.

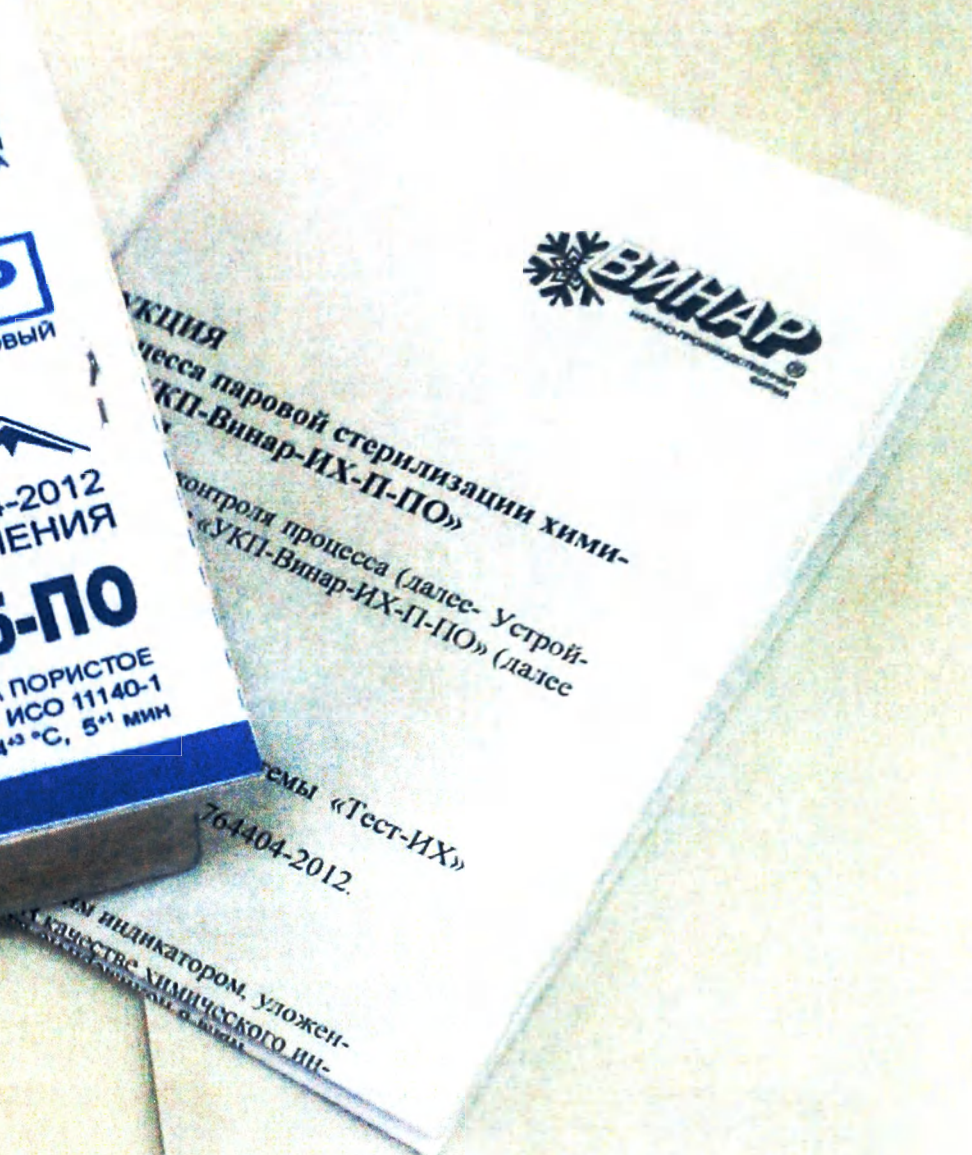



ГРУППА

я процесса паровой стерилизации
овых «УКП-Винар-ИХ-П-ПО»

65.2012 ИП

на устройства контроля процесса (далее
истые одноразовые «УКП-Винар-ИХ-П-ПО»

нар-ИХ-П5-ПО»,
р-ИХ-П121/20-ПО».

хся аналогами индикаторной системы «Т

в соответствии с ТУ 9398-093-11764404-20

бой стопку бумаги с химическим индикатором
отной бумагой (каптоном). В качестве химич

ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

ПАР
ТЕМНО-РОЗОВЫЙ

ТУ 9398-093-11764404-2012
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

УКП-Винар-ИХ-П5-ПО

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПОРИСТОЕ
С ХИМИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ КЛАССА 5 ПО ГОСТ Р ИСО 11140-1
ВСЕ РЕЖИМЫ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОРИСТЫХ И ПОЛЫХ ИЗДЕЛИЙ



СТРУКТУРА
я процесса паровой стерилизации хими-
овых «УКП-Винар-ИХ-П-ПО»
65.2012 ИП
на устройства контроля процесса (далее- Устрой-
истые одноразовые «УКП-Винар-ИХ-П-ПО» (д-
нар-ИХ-П15-ПО»,
р-ИХ-П1121/20-ПО»,
хся аналогами индикаторной
в соответствии с ТУ 9398-
бой стопку бумаги с
частной бумагой (карт



ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА



ТУ 9398-093-11764404-2012
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

УКП-Винар-ИХ-П134/18-ПО

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПОРИСТОЕ
С ХИМИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ КЛАССА В ПО ГОСТ Р ИСО 11140-1
РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ: 134^{±3} °С, 18^{±1} мин



Инструкция
к процессу паровой стерилизации биоло-
гических «УКП-Винар-ИБ-ПА-ПО»
ТУ 9398-093-11764404-2012 ИП
на устройство контроля процесса (Устройства) па-
ростерилизации «УКП-Винар-ИБ-ПА-ПО» (далее
«Тест-ИБ») (МУК 42.2
11764404-2012

БИОТЕСТ
Bacillus stear-
othermophilus
B-718

20°C



ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

ПАР

ТЕМНО-РОЗОВЫЙ



ТУ 9398-093-11764404-2012
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

УКП-Винар-ИБ-ПА-ПО

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПОРИСТОЕ
С БИОЛОГИЧЕСКИМИ АВТОНОМНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ
ВСЕ РЕЖИМЫ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОРИСТЫХ И ПОЛЫХ ИЗДЕЛИЙ



ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

ПАР
ТЕМНО-РОЗОВЫЙ

ТУ 9398-093-1176404-2012
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

УКП-Винар-ИБ-ПН-ПО
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ГОРИСТОГО
С БИОЛОГИЧЕСКИМ НЕАВТОНОМНЫМ ИНДИКАТОРАМИ
С РЕЖИМЫ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОРИСТЫХ ИТОЛЬК ИЗДЕЛИИ

Устройство контроля процесса паровой стерилизации биологическое неавтономное пористое одноразовое «УКП-Винар-ИБ-ПН-ПО» (далее - «УКП-Винар-ИБ-ПН-ПО») предназначено для контроля процесса паровой стерилизации биологических изделий (далее - «биологические изделия») в паровых стерилизаторах. Устройство «УКП-Винар-ИБ-ПН-ПО» предназначено для контроля процесса паровой стерилизации биологических изделий (далее - «биологические изделия») в паровых стерилизаторах. Устройство «УКП-Винар-ИБ-ПН-ПО» предназначено для контроля процесса паровой стерилизации биологических изделий (далее - «биологические изделия») в паровых стерилизаторах.

ВИНАР
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

Устройство контроля процесса паровой стерилизации биологическое неавтономное пористое одноразовое «УКП-Винар-ИБ-ПН-ПО» (далее - «УКП-Винар-ИБ-ПН-ПО») предназначено для контроля процесса паровой стерилизации биологических изделий (далее - «биологические изделия») в паровых стерилизаторах. Устройство «УКП-Винар-ИБ-ПН-ПО» предназначено для контроля процесса паровой стерилизации биологических изделий (далее - «биологические изделия») в паровых стерилизаторах.

ООО НТФ „Бионар“
13.01.2019 г.
Исполнено
сверх нормы
нормами
9 (ссыл) ученой.

