

УТВЕРЖДАЮ



Юлдашева Д.К.

2011 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

бинтов марлевых стерильных

(наименование изделия медицинского назначения)

1. Стерильные медицинские марлевые бинты применяются в операциях, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания, а также для перевязки поврежденных участков тела и сокрытия ран
2. Бинты производятся в соответствии с ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Технические условия».
Разрывная способность:
 - для стерильных – не менее 78 Н;Капиллярность готовых бинтов:
 - для стерильных – не менее 6,5 см;Бинты изготовлены из марли, изготовленной по ГОСТ 9412
Упакован бинт в пергамент медицинский марки «М»
На наружной стороне пергаментной оболочки типографским способом напечатаны: наименование предприятия –изготовителя и его товарный знак, размер изделия, обозначение стандарта, дата производства и дата стерилизации.
3. Раздражающее и аллергическое воздействие на кожу пациента отсутствует.
4. При подготовке к использованию нужно взять бинт в руки, разорвать оболочку перевернув бинт.
5. Пострадавший должен находиться в удобном положении, чтобы во время бинтования он не менял позу от усталости. Бинтуемая часть тела должна находиться в положении, в каком она будет после бинтования.
Бинтование нужно начинать с закрепляющего хода бинта.
Чтобы не вызывать излишней боли, при перевязки поддерживать поврежденную часть тела. Бинт держать в правой руке скаткой вверх. Бинтовать начинают снизу вверх.левой рукой удерживают повязку и разглаживают ходы бинта. Бинт раскатывают не отрывая от поверхности тела слева направо последующим оборотом прикрывая предыдущий на $\frac{1}{2}$ или $\frac{2}{3}$ его ширины. При бинтовании конечности пальцев оставляю свободными, повязку накладывают не очень туго, но и не очень слабо. В конце перевязки бинт надо закрепить на здоровом месте.

500
Хорошо и правельно наложенная бинтовая повязка должна: закрывать полностью больной участок тела, не нарушать лимфо- и кровообращение, быть удобной для больного

6. Бинты должны храниться в сухом проветриваемом помещении, в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действия солнечных лучей. Срок годности стерильных бинтов – 5 лет.

Должность ответственного за
производство

Ф.И.О.

(подпись)

Принято
и проинформировано
2 листа
Евд. Кержанова и

Сергей Сергеевич
Попов-Терехов

