

«Утверждаю»

Управляющий Хупфер
Металлверке ГмбХ & Ко.КГ
Манфред Подшмидт

HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG
Dieselstraße 20 · D-48653 Coesfeld
Postfach 1463 · D-48634 Coesfeld
Tel.: +49 (0) 25 41 / 805-0 Fax: -111
info@hupfer.de · www.hupfer.de

ПОДПИСЬ

« ____ » июня 2020 г.

Руководство по эксплуатации

Комплект мебели медицинской лабораторной с принадлежностями

Производства: Хупфер Металлверке Гмбх & Ко. КГ (Hupfer Metallwerke GmbH & Co.KG)

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями в вариантах исполнения:

1. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №1, в составе

1. Столы лабораторные рабочие:

- столы стационарные модель AT-O от 1 шт. до 100 шт.
- столы стационарные модель AT-Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы мобильные модель PT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель IT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель SBT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

2. Тележки:

- тележки транспортировочные открытые модель MSW от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OCTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OSTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для бумаги (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель CTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель STW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для отходов модель EC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

3. Стеллажи:

- стационарные модель NORM5 от 1 шт. до 100 шт.
- стационарные модель NORM5 Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- мобильные моделей RTWz (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- мобильные моделей RTWs (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- настенные (настенные шины) (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

4. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Полка для настенного стеллажа (поставляется при необходимости) до 100 шт
2. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, планов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
3. Рама с крючками для столов моделей AT-O, AT-Z, PT (поставляется при необходимости) до 100 шт
4. Корзина проволочная формат СтУ (StH) для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
5. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележки, стола (поставляется при необходимости) до 100 шт
6. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) до 100 шт
7. Корзина сетчатая для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
8. Корзина сетчатая с перфорированными стенками для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
9. Проволочный контейнер со скосом для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт

10. Держатель для обуви для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
11. Держатель для емкостей для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
12. Держатель для мочеприемников для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
13. Держатель для шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
14. Держатель для контейнеров для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
15. Держатель рулонов с режущим устройством для настенного стеллажа или стола всех моделей (поставляется при необходимости)
16. Держатель мешков для мусора или белья для тележек (поставляется при необходимости) до 100 шт
17. Универсальный держатель для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) до 100 шт

II. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №1А, в составе

1. Столы лабораторные рабочие:

- столы мобильные модель РТ – от 1 шт. до 100 шт.
- столы стационарные модель АТ-О (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы стационарные модель АТ-З (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель ИТ (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель SBT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

2. Тележки:

- тележки транспортировочные открытые модель MSW – от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OCTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OSTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для бумаги (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель CTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель STW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для отходов модель EC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

3. Стеллажи:

- стационарные модель NORM5 – от 1 шт. до 100 шт.
- стационарные модель NORM5 Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- мобильные модель RTWz (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- мобильные модель RTWs (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- настенные (настенные шины) (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

4. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Полка для настенного стеллажа (поставляется при необходимости) до 100 шт
2. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, планов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
3. Рама с крючками для столов моделей АТ-О, АТ-З, РТ (поставляется при необходимости) до 100 шт
4. Корзина проволочная формат СтУ (StE) для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт

5. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележки, стола (поставляется при необходимости) до 100 шт
6. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) до 100 шт
7. Корзина сетчатая для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
8. Корзина сетчатая с перфорированными стенками для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
9. Проволочный контейнер со скосом для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
10. Держатель для обуви для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
11. Держатель для емкостей для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
12. Держатель для мочеприемников для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
13. Держатель для шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
14. Держатель для контейнеров для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
15. Держатель рулонов с режущим устройством для настенного стеллажа или стола всех моделей (поставляется при необходимости) до 100 шт
16. Держатель мешков для мусора или белья для тележек (поставляется при необходимости) до 100 шт
17. Универсальный держатель для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) до 100 шт

III. Набор мебели медицинской лабораторией с принадлежностями №1Б, в составе

1. Столы лабораторные рабочие:

- столы стационарные модель АТ-О – от 1 шт. до 100 шт.
- столы стационарные модель АТ-Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы мобильные модель РТ (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель ИТ (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель SBT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

2. Тележки:

- тележки транспортировочные закрытые модель СТW – от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OCTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OSTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для бумаги (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель STW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для отходов модель EC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

3. Стеллажи:

- стационарные модель NORM5 Medidul – от 1 шт. до 100 шт.
- стационарные модель NORM5 (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- мобильные модель RTWz (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

- мобильные модели RTWs (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- настенные (настенные шины) (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

4. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Полка для настенного стеллажа (поставляется при необходимости) до 100 шт
2. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
3. Рама с крючками для столов моделей AT-O, AT-Z, PT (поставляется при необходимости) до 100 шт
4. Корзина проволочная формат СтУ (StE) для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
5. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележки, стола (поставляется при необходимости) до 100 шт
6. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) до 100 шт
7. Корзина сетчатая для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
8. Корзина сетчатая с перфорированными стенками для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
9. Проволочный контейнер со скосом для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележек, столов (поставляется при необходимости) до 100 шт
10. Держатель для обуви для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
11. Держатель для емкостей для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
12. Держатель для мочеприемников для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
13. Держатель для шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
14. Держатель для контейнеров для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) до 100 шт
15. Держатель рулонов с режущим устройством для настенного стеллажа или стола всех моделей (поставляется при необходимости) до 100 шт
16. Держатель мешков для мусора или белья для тележек (поставляется при необходимости) до 100 шт
17. Универсальный держатель для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) до 100 шт

IV. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №1B, в составе

1. Столы лабораторные рабочие:

- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель Z – от 1 шт. до 100 шт.
- столы стационарные модель AT-O (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы стационарные модель AT-Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель IT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель SBT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- столы мобильные модель PT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

2. Тележки:

- тележки транспортировочные закрытые модель STW – от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OCTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OSTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для бумаги (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель CTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- тележки для отходов модель EC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

3. Стеллажи:

- настенные (настенные пины) - от 1 шт. до 100 шт.
- стационарные модель NORM5 Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- мобильные моделей RTWz (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- мобильные моделей RTWs (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.
- стационарные модель NORM5 (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 100 шт.

4. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Полки для настенного стеллажа (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
2. Рамы с крючками для столов моделей AT-O, AT-Z, PT (поставляется при необходимости) - не более 100 шт.
3. Корзины проволочные формат СтУ (StE) для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
4. Корзины проволочные формат ИСО (ISO) для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележки, стола (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
5. Корзины проволочные для инструментов (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
6. Корзины сетчатые для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
7. Корзины сетчатые с перфорированными стенками для всех моделей стеллажей, тележек, столов (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
8. Держатели рулонов с режущим устройством для настенного стеллажа или столов всех моделей (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
9. Универсальные держатели для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.

V. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №2, в составе

1. Тележки:

- тележки для бумаги - от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OCTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OSTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель CTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель STW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель EC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

2. Стеллажи:

- мобильные моделей RTWs - от 1 шт. до 50 шт.
- стационарные модель NORM5 (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- стационарные модель NORM5 Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWz (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- настенные (настенные пины) (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

3. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Полка для настенного стеллажа (поставляется при необходимости) - не более 15 шт. на 1 стеллаж
2. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов (поставляется при необходимости) - не более 5 шт.
3. Корзина проволочная формат СтУ (StE) (поставляется при необходимости) - не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж

4. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
5. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
6. Корзина сетчатая (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
7. Корзина сетчатая с перфорированными стенками (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
8. Проволочный контейнер со скосом (поставляется при необходимости) – не более 30 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
9. Держатель для обуви (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
10. Держатель для емкостей (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
11. Держатель для мочеприемников (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
12. Держатель для шлангов (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
13. Держатель для контейнеров (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
14. Держатель рулонов с режущим устройством (поставляется при необходимости) – не более 2 шт.
15. Держатель мешков для мусора или белья для тележек (поставляется при необходимости) – не более 2 шт.
16. Универсальные держатели для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) – не более 10 шт.

VI. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №2А, в составе

1. Тележки:

- тележки транспортировочные закрытые модель STW – от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSW (поставляется при необходимости) – от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OCTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OSTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для бумаги (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель CTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель EC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

2. Стеллажи:

- настенные (настенные пины) – от 1 шт. до 50 шт.
- стационарные модель NORM5 (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- стационарные модель NORM5 Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWz (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWs (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

3. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Полка для настенного стеллажа (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 стеллаж
2. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов (поставляется при необходимости) – не более 5 шт.
3. Корзина проволочная формат СтУ (StE) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
4. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
5. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
6. Корзина сетчатая (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж

7. Корзина сетчатая с перфорированными стенками (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
8. Проволочный контейнер со скосом (поставляется при необходимости) – не более 30 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
9. Держатель для обуви (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
10. Держатель для емкостей (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
11. Держатель для мочеприемников (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
12. Держатель для шлангов (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
13. Держатель для контейнеров (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
14. Держатель рулонов с режущим устройством (поставляется при необходимости) – не более 2 шт.
15. Держатель мешков для мусора или белья для тележек (поставляется при необходимости) – не более 2 шт.
16. Универсальные держатели для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) – не более 10 шт.

VII. Набор мебели медицинской лабораторией с принадлежностями №2Б, в составе

1. Тележки:

- тележки транспортировочные открытые модель OSTW – от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OCTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для бумаги (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель CTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель STW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель EC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

2. Стеллажи:

- мобильные моделей RTWz – от 1 шт. до 50 шт.
- стационарные модель NORM5 (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- стационарные модель NORM5 Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- настенные (настенные пины) (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWs (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

3. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Полка для настенного стеллажа (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 стеллаж
2. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов (поставляется при необходимости) – не более 5 шт.
3. Корзина проволочная формат CrY (StE) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
4. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
5. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
6. Корзина сетчатая (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
7. Корзина сетчатая с перфорированными стенками (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
8. Проволочный контейнер со скосом (поставляется при необходимости) – не более 30 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
9. Держатель для обуви (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
10. Держатель для емкостей (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж

11. Держатель для мочеприемников (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
12. Держатель для плангов (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
13. Держатель для контейнеров (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
14. Держатель рулонов с режущим устройством (поставляется при необходимости) – не более 2 шт.
15. Держатель мешков для мусора или белья для тележек (поставляется при необходимости) – не более 2 шт.
16. Универсальные держатели для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) – не более 10 шт.

VIII. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №2В, в составе

1. Тележки:

- тележки с кронштейнами – от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OCTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OSTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележка для бумаги (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель CTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель STW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель EC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

2. Стеллажи:

- стационарные модель NORM5 от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWs (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- стационарные модель NORM5 Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWz (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- настенные (настенные плиты) (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

3. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Полка для настенного стеллажа (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 стеллаж
2. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, плангов (поставляется при необходимости) – не более 5 шт.
3. Корзина проволочная формат СтУ (StE) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
4. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
5. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
6. Корзина сетчатая (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
7. Корзина сетчатая с перфорированными стенками (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
8. Проволочный контейнер со скосом (поставляется при необходимости) – не более 30 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
9. Держатель для обуви (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
10. Держатель для емкостей (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
11. Держатель для мочеприемников (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
12. Держатель для плангов (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
13. Держатель для контейнеров (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку или 1 стеллаж
14. Держатель рулонов с режущим устройством (поставляется при необходимости) – не более 2 шт.
15. Держатель мешков для мусора или белья для тележек (поставляется при необходимости) – не более 2 шт.
16. Универсальные держатели для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) – не более 10 шт.

IX. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №3, в составе

1. Столы лабораторные рабочие:

- столы мобильные модель РТ – от 1 шт. до 50 шт.
- столы стационарные модель АТ-О (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы стационарные модель АТ-Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель ИТ (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель SBT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

2. Тележки:

- тележки с кронштейнами – от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OCTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OSTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для бумаги (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель CTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель STW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель FC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

3. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов (поставляется при необходимости) – не более 5 шт.
2. Рама с крючками для столов моделей АТ-О, АТ-Z, РТ (поставляется при необходимости) – не более 1 шт. на 1 стол
3. Корзина проволочная формат CrV (StE) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 стол или 1 тележку
4. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 стол или 1 тележку
5. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 стол или 1 тележку
6. Корзина сетчатая (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 стол или 1 тележку
7. Корзина сетчатая с перфорированными стенками (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 стол или 1 тележку
8. Проволочный контейнер со скосом (поставляется при необходимости) – не более 30 шт. на 1 стол или 1 тележку
9. Держатель для обуви (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку
10. Держатель для емкостей (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку
11. Держатель для мочеприемников (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку
12. Держатель для шлангов (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку
13. Держатель для контейнеров (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку
14. Держатель рулонов с режущим устройством (поставляется при необходимости) – не более 2 шт. на 1 стол
15. Держатель мешков для мусора или белья (поставляется при необходимости) – не более 2 шт. на 1 тележку
16. Универсальный держатель для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) – не более 10 шт.

X. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №3А, в составе

1. Столы лабораторные рабочие:

- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель Z – от 1 шт. до 50 шт.
- столы стационарные модель AT-O (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы стационарные модель AT-Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы мобильные модель PT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель IT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель SBT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

2. Тележки:

- тележки транспортировочные открытые модель OCTW – от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель MSSW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель STW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель OSTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные открытые модель AZW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для бумаги (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки с кронштейнами Medidul (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки транспортировочные закрытые модель CTW (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель SWA (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- тележки для отходов модель EC (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

3. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Подвесная шланка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов (поставляется при необходимости) – не более 5 шт. на 1 тележку
2. Рама с крючками для столов моделей AT-O, AT-Z, PT (поставляется при необходимости) – не более 1 шт. на 1 стол
3. Корзина проволочная формат CrY (StE) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стол
4. Корзина проволочная формат ICO (ISO) (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стол
5. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стол
6. Корзина сетчатая (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стол
7. Корзина сетчатая с перфорированными стенками (поставляется при необходимости) – не более 15 шт. на 1 тележку или 1 стол
8. Проволочный контейнер со скосом (поставляется при необходимости) – не более 30 шт. на 1 стол или 1 тележку
9. Держатель для обуви (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку
10. Держатель для емкостей (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку
11. Держатель для мочеприемников (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку
12. Держатель для пиланов (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 тележку
13. Держатель для контейнеров (поставляется при необходимости) – не более 10 шт. на 1 стол или 1 тележку
14. Держатель рулонов с режущим устройством (поставляется при необходимости) – не более 2 шт. на 1 стол
15. Держатель мешков для мусора или белья (поставляется при необходимости) – не более 2 шт. на 1 тележку
16. Универсальный держатель для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) – не более 10 шт.

XI. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №4, в составе

1. Столы лабораторные рабочие:

- столы мобильные модель PT – от 1 шт. до 50 шт.

- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы стационарные модель AT-O (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы стационарные модель AT-Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель IT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель SBT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

2. Стеллажи:

- стационарные модель NORM5 Medidul - от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWz (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWs (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- стационарные модель NORM5 (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- настенные (настенные шины) (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

3. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов (поставляется при необходимости) - не более 20 шт.
2. Рама с крючками для столов моделей AT-O, AT-Z, PT (поставляется при необходимости) - не более 1 шт. на 1 стол
3. Корзина проволочная формат СтУ (StE) (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
4. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
5. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
6. Корзина сетчатая (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
7. Корзина сетчатая с перфорированными стенками (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
8. Проволочный контейнер со скосом (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
9. Держатель для обуви (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
10. Держатель для емкостей (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
11. Держатель для мочеиспускников (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
12. Держатель для вливангов (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
13. Держатель для контейнеров (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.
14. Держатель рулонов с режущим устройством (поставляется при необходимости) - не более 2 шт. на 1 стол
16. Универсальный держатель для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) - не более 50 шт.

ХП. Набор мебели медицинской лабораторной с принадлежностями №4А, в составе

1. Столы лабораторные рабочие:

- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель IT - от 1 шт. до 50 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы стационарные модель AT-O (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы стационарные модель AT-Z (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы мобильные модель PT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- столы для инструментов и стерильного материала мобильные модель SBT (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

2. Стеллажи:

- стационарные модель NORM5 Medidul - от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWz (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- мобильные моделей RTWs (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- стационарные модель NORM5 (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.
- настенные (настенные шины) (поставляется при необходимости) от 1 шт. до 50 шт.

3. Руководство по эксплуатации

Принадлежности:

1. Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов (поставляется при необходимости) - не более 20 шт.

2. Рама с крючками для столов моделей АТ-О, АТ-Z, РТ (поставляется при необходимости) – не более 1 шт. на 1 стол
3. Корзина проволочная формат СтУ (StU) (поставляется при необходимости) – не более 50 шт. 4. Корзина проволочная формат ИСО (ISO) (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
5. Корзина проволочная для инструментов (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
6. Корзина сетчатая (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
7. Корзина сетчатая с перфорированными стенками (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
8. Проволочный контейнер со скосом (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
9. Держатель для обуви (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
10. Держатель для емкостей (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
11. Держатель для мочеприемников (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
12. Держатель для штангов (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
13. Держатель для контейнеров (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.
14. Держатель рулонов с режущим устройством (поставляется при необходимости) – не более 2 шт. на 1 стол
16. Универсальный держатель для всех моделей столов и тележек (поставляется при необходимости) – не более 50 шт.

Готовые мебельные изделия поставляются укомплектованными в соответствии с рабочими чертежами и конструкторской документацией.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект мебели медицинской лабораторной с принадлежностями (далее – мебель, мебель медицинская, изделия, изделие, мебель лабораторная) предназначена для установки в медицинских учреждениях и лабораториях с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения лекарств, инструментов, материалов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей

Область применения: клиничко-диагностические лаборатории, больницы и пр. медицинские учреждения.

Потенциальные потребители комплекта мебели: врачи—лаборанты, фельдшера—лаборанты, медицинские технологи, медицинские сестры.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовое решение мебели серое (цвет стали, без покрытия).

Мебель должна быть устойчива при эксплуатации к воздействию климатических факторов категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Номинальное значение температуры окружающей среды: от плюс 10 до плюс 40 °С, относительная влажность при температуре 25 °С – до 75%.

Несущие конструкции мебели (каркасы, основания) изготавливаются замкнутого сечения.

Накладные, декоративные элементы закреплены неподвижно.

Мебель характеризуется жесткой и прочной конструкцией, удобной для эксплуатации в соответствии с её назначением, и отвечает необходимым декоративным и эстетическим требованиям.

Конструкция мебели с отделениями для хранения лабораторных и других принадлежностей обеспечивает свободный доступ к ним.

Функциональные размеры

Функциональные размеры мебельных изделий соответствуют значениям ГОСТ 13025.1, ГОСТ 26800.4 и рабочим чертежам.

Предельные отклонения от установленных габаритных размеров не превышают ± 4 мм для габаритных размеров до 2 000 мм, ± 5 для размеров свыше 2 000 мм.

Зазоры в просах на сторону не превышают:

- 1,5 мм – для полок

- 2,0 мм – для дверей;

Отклонение столешниц от плоскостности не должно препятствовать стеканию жидкостей, при этом допускается обустройство канавок с уклоном 1 : 100 в сторону сливного устройства.

Габаритные размеры мебели, должны соответствовать Таблице 1, допуски указаны по тексту документа выше.

Таблица 1.

Наименование	Внешние размеры (ДхШхВ), мм
Стол лабораторный рабочий:	
стол стационарный АТ-О 1	1000х750х850
стол стационарный АТ-О 2	1200х750х850
стол стационарный АТ-О 3	1500х750х850
стол стационарный АТ-З 1	1000х750х850
стол стационарный АТ-З 2	1200х750х850
стол стационарный АТ-З 3	1500х750х850
стол мобильный РТ 1	850х750х900
стол мобильный РТ 2	1447х750х900
стол для инструментов ИТ 1	625х425х800
стол для инструментов ИТ 2	720х625х800
стол для инструментов ИТ 3	940х625х800
стол для стерильного материала SBT	700х700х900
стол для инструментов Z, шаг регулировки подъема изделия (В) – 50 мм до высоты 1165 мм, последний шаг регулировки подъема составляет 35 мм.	627х400х715-1200
Тележка:	
тележка открытая MSW 1	700х500х895
тележка открытая MSW 2	895х595х960
тележка открытая MSW 3	1095х695х960

тележка открытая MSSW 1	895x595x1023
тележка открытая MSSW 2	1095x695x1023
тележка открытая OCTW 1	825x675x1367
тележка открытая OCTW 2	1155x675x1367
тележка открытая OSTW 1	825x675x1367
тележка открытая OSTW 2	1175x675x1367
тележка открытая AZW 1	625x425x800
тележка открытая AZW 2	720x625x800
тележка открытая AZW 3	920x625x800
тележка открытая AZW 4	1200x625x800
тележка для бумаги	1410x725x995
тележка с кронштейнами 1	605x465x1097
тележка с кронштейнами 2	605x465x1460
тележка с кронштейнами 3	605x465x1620
тележка с кронштейнами 4	605x675x1097
тележка с кронштейнами 5	605x675x1460
тележка с кронштейнами 6	605x675x1620
тележка с кронштейнами MEDIDUL	650x1005x1657
тележка закрытая CTW 1	965x754x1445
тележка закрытая CTW 2	1249x754x1440
тележка закрытая CTW 3	965x751x1469
тележка закрытая CTW 4	1249x751x1469
тележка закрытая STW 1	965x754x1445
тележка закрытая STW 2	1249x754x1440
тележка закрытая STW 3	965x751x1469
тележка закрытая STW 4	1249x751x1469
тележка для отходов SWA 1	350x450x905
тележка для отходов SWA 2	680x450x905
тележка для отходов SWA 3	1010x450x905
тележка для отработанного материала ЕС для контейнеров	640x375x900
Стеллаж:	
стационарный NORM5 1	600x300x1800
стационарный NORM5 2	600x400x1800
стационарный NORM5 3	600x500x1800
стационарный NORM5 4	600x600x1800
стационарный NORM5 5	800x300x1800
стационарный NORM5 6	800x400x1800
стационарный NORM5 7	800x500x1800
стационарный NORM5 8	800x600x1800
стационарный NORM5 9	900x300x1800
стационарный NORM5 10	900x400x1800
стационарный NORM5 11	900x500x1800

стационарный NORM5 12	900x600x1800
стационарный NORM5 13	1000x300x1800
стационарный NORM5 14	1000x400x1800
стационарный NORM5 15	1000x500x1800
стационарный NORM5 16	1000x600x1800
стационарный NORM5 17	1200x300x1800
стационарный NORM5 18	1200x400x1800
стационарный NORM5 19	1200x500x1800
стационарный NORM5 20	1200x600x1800
стационарный NORM5 21	1400x300x1800
стационарный NORM5 22	1400x400x1800
стационарный NORM5 23	1400x500x1800
стационарный NORM5 24	1400x600x1800
стационарный NORM5 25	1500x300x1800
стационарный NORM5 26	1500x400x1800
стационарный NORM5 27	1500x500x1800
стационарный NORM5 28	1500x600x1800
стационарный NORM5 MEDIDUL 1	355x600x1800
стационарный NORM5 MEDIDUL 2	455x600x1800
стационарный NORM5 MEDIDUL 3	355x600x2000
стационарный NORM5 MEDIDUL 4	455x600x2000
мобильный стеллаж RTWz 1	1075x675x1200
мобильный стеллаж RTWz 2	1475x675x1200
мобильный стеллаж RTWs 1	1265x663x1807
мобильный стеллаж RTVs 2	1065x663x1807
настенный стеллаж (настенная шина) 1	43x40x700
настенный стеллаж (настенная шина) 2	43x40x900
настенный стеллаж (настенная шина) 3	43x40x1050
настенный стеллаж (настенная шина) 4	43x40x1300
настенный стеллаж (настенная шина) 5	43x40x1400
настенный стеллаж (настенная шина) 6	43x40x1600
настенный стеллаж (настенная шина) 7	43x40x1750
Принадлежности:	
Полка для настенного стеллажа 1	695x450x165
Полка для настенного стеллажа 2	695x350x165
Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами 8 крюков	555x186x82
Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами 6 крюков	636x186x71
Рама №1 с крючками для столов моделей AT-O, AT-Z, PT	1250x40x1447
Рама №2 с крючками для столов моделей AT-O, AT-Z, PT	555x40x1447
Корзина проволочная формат СтУ (StF) 1	600x300x300

Корзина проволочная формат СтУ (StE) 2	600x300x150
Корзина проволочная формат СтУ (StE) 3	575x280x265
Корзина проволочная формат СтУ (StE) 4	575x280x135
Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 1	600x400x300
Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 2	600x400x180
Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 3	600x400x150
Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 4	600x400x100
Корзина проволочная для инструментов	245x175x90
Корзина сетчатая	480x250x100
Корзина сетчатая с перфорированными стенками	480x250x100
Проволочный контейнер со скосом 1	215x350x200
Проволочный контейнер со скосом 2	153x231x125
Держатель для обуви	600x263x191
Держатель для емкостей	560x281x180
Держатель для мочеиспускников	560x248x272
Держатель для планов	600x113x181
Держатель для контейнеров	650x320x130
Держатель рулонов с режущим устройством 1 для настенного стеллажа и стола всех моделей	630x373x294
Держатель рулонов с режущим устройством 2 для настенного стеллажа и стола всех моделей	910x373x294
Держатель мешков для мусора или белья для тележек	555x313x240
Универсальный держатель для крепления проволочных контейнеров для всех моделей столов и тележек	655x20x108

Максимальная нагрузка на столешницу должна быть не более 50 кг.

Изделия: стол мобильный PT 1, стол мобильный PT 2, стол для инструментов IT 1, стол для инструментов IT 2, стол для инструментов IT 3, стол для стерильного материала SBT, стол для инструментов Z, тележка открытая MSW 1, тележка открытая MSW 2, тележка открытая MSW 3, тележка открытая MSSW 1, тележка открытая MSSW 2, тележка открытая OCTW 1, тележка открытая OCTW 2, тележка открытая OSTW 1, тележка открытая OSTW 2, тележка открытая AZW 1, тележка открытая AZW 2, тележка открытая AZW 3, тележка для бумаги, тележка с кронштейнами 1, тележка с кронштейнами 2, тележка с кронштейнами 3, тележка с кронштейнами 4, тележка с кронштейнами 5, тележка с кронштейнами 6, тележка с кронштейнами MEDIDUL, тележка закрытая CTW 1, тележка закрытая CTW 2, тележка закрытая CTW 3, тележка закрытая CTW 4, тележка закрытая STW 1, тележка закрытая STW 2, тележка закрытая STW 3, тележка закрытая STW 4, тележка для отходов SWA1, тележка для отходов SWA2, тележка для отходов SWA3, тележка для отработанного материала ЕС для контейнеров, мобильный стеллаж RTWz 1, мобильный стеллаж RTWz 2, мобильный стеллаж RTWs 1, мобильный стеллаж RTWs 2, оснащены тормозом (фиксатором) ножным, усилие прикладываемое для включения (нажатия) тормоза 25 Н +/- 5 Н, усилие прикладываемое для отключения (подъема) тормоза 15 Н +/- 5 Н.

Максимальная нагрузка на полки должна быть не более 40 кг.

Накладные задние стёжки не должны выступать за наружные плоскости боковых и верхних горизонтальных щитов мебельных изделий; ребра торцов погонажных деталей должны быть приглушены. Все доступные кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и свободны от заусенцев.

Выдвижные, трансформируемые и раздвижные элементы мебельных изделий должны иметь свободный ход, без заеданий и перекосов.

При эксплуатации подвижных частей должна быть обеспечена их безопасность для жизни и здоровья человека при условии соблюдения правил эксплуатации.

Замки должны быть закреплены на деталях изделий неподвижно и прочно, должно обеспечиваться их легкое отпирание и запирание.

Самопроизвольное отсоединение съёмных частей в мебельных изделиях не допускается.

Мебель в состоянии эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания; допустимый зазор между одной из опор и полом у стеллажей — не более 5 мм, у столов, тележек — не более 3 мм.

Конструкция мебели должна быть унифицированной, и обеспечивать ремонтпригодность и взаимозаменяемость составных частей (элементов), в случае, если конструкция разборная.

Мебель должна быть стойкой к дезинфекции 1% раствора хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства типа «Мотос» по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты сварных соединений, а также дефекты, предусмотренные ГОСТ 20400, в т. ч.:

- шлифовка;
- потертость;
- загрязнение поверхности;
- вмятины;
- царапины;
- трещины;
- пятна;
- заусенцы.

Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев.

В местах сгиба листового металла не должно наблюдаться трещин.

Шероховатость поверхностей материалов R_m , с которыми при эксплуатации соприкасается человек, составляет не более 63 мкм по ГОСТ 2789/ГОСТ 7016.

Требования к прочности

Все горизонтальные несущие элементы мебельных изделий должны выдерживать нагрузку не менее 150 даН на 1 м² площади.

Прогиб горизонтальных несущих элементов под действием нагрузки не должен превышать 6 мм на 1 м длины.

Допустимые воздействия внешних механических факторов - по группе 1 ГОСТ Р 50444 и группе М1 ГОСТ 30631.

Ручки должны выпускать длиной 96 $\pm$ 1 мм для любых исполнений изделий.

Средний срок службы мебели до списания - не менее 10 лет.

Колесные опоры (при их наличии) должны свободно и без заедания вращаться на горизонтальной оси от усилия не более 0,35 Н (0,035 кгс).

Мебельные изделия с опорами качения должны начинать движение в рабочем положении с равномерно распределенной 1,5-кратной номинальной нагрузкой (по твердой поверхности) при приложении к ним силы не более 60 Н (6 кгс).

Диаметр колеса - 75 мм $\pm$ 1 мм, нагрузка до 50 кг.

Нагрузка при стационарной опоре - до 100 кг.

Зазоры в проемах на сторону не должны превышать:

- 1,5 мм - для полок.

- 2,0 мм - для дверей;

Требования к соединениям

Резьбовые соединения должны соответствовать ГОСТ 16093 с полями допусков для болтов - 8g, для гаек - H8.

Фиксирующие винты, которые при эксплуатации подвергаются отвинчиванию, обладают механической прочностью.

Детали, постоянно соединяемые между собой должны скреплены таким образом, что исключает возможность ослабления соединения.

20

При изготовлении рам и каркасов мебели следует применять виды и технологию сварки, обеспечивающие полный провар шва, не допускающие образование кристаллизационных сварочных трещин.

Временное сопротивление наплавленного металла равно временному сопротивлению основного металла.

Отклонения размеров швов сварных соединений от проектных не превышает значений, указанных в ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 11533, ГОСТ 11534, ГОСТ 14771 и ГОСТ 23518.

Все сварные швы непрерывны и сплошные и по окончании сварки очищены от шлака, брызг и налетов металла.

Металлические ножки должны иметь пластмассовые насадки-заглушки, обеспечивающие зазор не более 3 мм между металлическим профилем ножек и полом.

Мебель по высоте не регулируется.

Конструкция мебели обеспечивает сток обмывочных жидкостей; количество пазов и выступов, способствующих скоплению загрязнений, минимально.

В конструкции нет не промываемых мест, перегородок, резких сужений поперечного сечения и других недоступных мест.

Масса изделий должна быть, Таблица 7:

Таблица 7

Наименование	масса, кг
Стол лабораторный рабочий:	
стол стационарный АТ-О 1	25,50
стол стационарный АТ-О 2	27,00
стол стационарный АТ-О 3	30,00
стол стационарный АТ-З 1	42,00
стол стационарный АТ-З 2	42,70
стол стационарный АТ-З 3	45,50
стол мобильный РТ 1	25,00
стол мобильный РТ 2	36,80
стол для инструментов ИТ 1	13,00
стол для инструментов ИТ 2	16,10
стол для инструментов ИТ 3	19,40
стол для стерильного материала SBT	18,00
стол для инструментов З 1,2	16,00
Тележка:	
тележка открытая MSW 1	13,00
тележка открытая MSW 2	15,30
тележка открытая MSW 3	22,00
тележка открытая MSSW 1	27,00

тележка открытая MSSW 2	30,00
тележка открытая OCTW 1	29,50
тележка открытая OCTW 2	36,00
тележка открытая OSTW 3	29,50
тележка открытая OSTW 4	36,00
тележка открытая AZW 1	16,40
тележка открытая AZW 2	17,00
тележка открытая AZW 3	18,10
тележка открытая AZW 4	19,00
тележка для бумаги	15,39
тележка с кронштейнами 1	5,80
тележка с кронштейнами 2	6,00
тележка с кронштейнами 3	6,60
тележка с кронштейнами 4	5,80
тележка с кронштейнами 5	6,00
тележка с кронштейнами 6	6,80
тележка с кронштейнами MEDIDUL	13,00
тележка закрытая CTW 1	85,00
тележка закрытая CTW 2	100,00
тележка закрытая CTW 3	85,00
тележка закрытая CTW 4	100,00
тележка закрытая STW 1	85,00
тележка закрытая STW 2	100,00
тележка закрытая STW 3	85,00
тележка закрытая STW 4	100,00
тележка для отходов SWA 1	5,00
тележка для отходов SWA 2	9,90
тележка для отходов SWA3	6,00
тележка для отработанного материала ЕС для контейнеров	9,00
Стеллаж:	
стационарный NORM5 1	17,80
стационарный NORM5 2	19,00
стационарный NORM5 3	20,07
стационарный NORM5 4	21,00
стационарный NORM5 5	18,00
стационарный NORM5 6	20,45
стационарный NORM5 7	22,85
стационарный NORM5 8	25,00
стационарный NORM5 9	20,02
стационарный NORM5 10	22,38
стационарный NORM5 11	24,58
стационарный NORM5 12	26,40
стационарный NORM5 13	19,64

стационарный NORM5 14	23,50
стационарный NORM5 15	25,94
стационарный NORM5 16	27,02
стационарный NORM5 17	29,80
стационарный NORM5 18	31,70
стационарный NORM5 19	33,08
стационарный NORM5 20	35,40
стационарный NORM5 21	31,10
стационарный NORM5 22	33,90
стационарный NORM5 23	36,72
стационарный NORM5 24	38,00
стационарный NORM5 25	33,98
стационарный NORM5 26	36,50
стационарный NORM5 27	38,72
стационарный NORM5 28	39,58
стационарный NORM5 MEDIDUL 1	17,44
стационарный NORM5 MEDIDUL 2	17,80
стационарный NORM5 MEDIDUL 3	17,80
стационарный NORM5 MEDIDUL 4	18,10
мобильный стеллаж RTWz 1	36,00
мобильный стеллаж RTWz 2	40,00
мобильный стеллаж RTWs 1	30,95
мобильный стеллаж RTWs 2	29,80
настенный стеллаж (настенная шина) 1	0,63
настенный стеллаж (настенная шина) 2	1,00
настенный стеллаж (настенная шина) 3	1,00
настенный стеллаж (настенная шина) 4	1,14
настенный стеллаж (настенная шина) 5	1,27
настенный стеллаж (настенная шина) 6	1,43
настенный стеллаж (настенная шина) 7	1,45
Принадлежности:	
полка для настенного стеллажа 1	3,38
полка для настенного стеллажа 2	3,00
Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами 8 крюков	0,97
Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами 6 крюков	1,00
рама с крючками для столов моделей AT-O, AT-Z, PT	10,60
рама с крючками для столов моделей AT-O, AT-Z, PT	5,07
корзина проволочная формат СтУ (StE) 1	2,40
корзина проволочная формат СтУ (StE) 2	1,80
корзина проволочная формат СтУ (StE) 3	2,33
корзина проволочная формат СтУ (StE) 4	1,77
Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 1	2,40

Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 2	2,11
Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 3	1,97
Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 4	1,84
Корзина проволочная для инструментов	1,00
Корзина сетчатая	2,56
Корзина сетчатая с перфорированными стенками	2,48
Проволочный контейнер со скосом 1	0,98
Проволочный контейнер со скосом 2	0,42
Держатель для обуви	2,40
Держатель для емкостей	1,47
Держатель для мочеприемников	2,11
Держатель для плангов	1,20
Держатель для контейнеров	2,30
Держатель рулонов с режущим устройством	10,12
Держатель мешков для мусора или белья для тележек	6,00
Универсальный держатель для крепления проволочных контейнеров для всех моделей столов и тележек	1,09

Примечание: Допустимые отклонения массы для всех изделий 0,2 кг.

По классификации ГОСТ 31508 и Приложения №2 к Приказу Минздрава № 4н от 6 июня 2012 г. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (с изменениями от 25 сентября 2014 г.) мебель относится к медицинским изделиям длительного применения 1 класса по степени потенциального риска, группы 2, подгруппы 2.15, а по возможным последствиям отказа – к изделиям класса «Г» по ГОСТ Р 50444/ГОСТ 20790.

Используемые материалы:

- пержавающая сталь марки AISI 430;
- фурнитура производства HUPFER GmbH: сталь AISI 430.

Покрывтия отсутствуют.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 1 настоящего руководства по эксплуатации, а также рекомендуется осуществить дезинфекцию в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Проведения очистки принадлежностей возможно механизированным способом в автоматических мощно-дезинфекционных машинах водоструйных и ультразвуковых, так как не создают препятствий для доступа воды с моющим веществом и не являются экраном для задержки ультразвуковых волн. Мебель поставляется в собранном состоянии.

Мебель располагается на горизонтальной твердой поверхности пола.

Мебель в состоянии эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания.

При эксплуатации изделия следует предохранять от механических повреждений.

В процессе эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов мебели (в разборных конструкциях), особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере необходимости) подтягивать винты в петлях, в монтажных планках и других элементах крепежа.

Требования к помещениям:

- Помещение должно иметь достаточно свободного места для размещения необходимого количества мебели.

- Обязательное наличие ровных полов в помещении.

- Помещение должно быть хорошо отапливаемо. Температуры ниже +10 °С и выше +40 °С не обеспечивают необходимые условия для эксплуатации мебели.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами медицинского персонала или пользователя.

Обслуживание и уход

Исключите грубое механическое воздействие на изделия.

Правила эксплуатации

Изделия должны использоваться строго по назначению.

Сидеть или стоять на столах и стеллажах и тележках, а также перевозка людей не допускается.

Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим допустимую нагрузку, указанную в технических характеристиках. Запрещается оставлять без присмотра мебель на колесах на наклонных поверхностях пола.

В случае ущерба, вызванного ненадлежащей эксплуатацией, не предполагается никакой ответственности и не принимаются никакие гарантийные рекламации.

Завод – изготовитель гарантирует исправную работу изделий в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, ухода и использования изложенных в настоящем руководстве.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условия эксплуатации

Мебель устойчива при эксплуатации к воздействию климатических факторов категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Номинальное значение температуры окружающей среды: от +10 до +40°С, относительная влажность при температуре 25 °С – до 75%.

Маркировка

Маркировка содержит следующие сведения:

- наименование изделия полное;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и его товарный знак;
- наименование и обозначение мебели по настоящему техническому файлу;
- дату изготовления;
- гарантии изготовителя;
- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;
- правила утилизации;
- сведения о сертификации (декларировании), знак по ГОСТ Р 50460 и единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза.

Допускается нанесение других сведений, в том числе рекламного характера.

Сведения наносятся типографским способом либо путем штампования, обеспечивающим их читаемость и сохранность.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474 с нанесением манипуляционных знаков «Верх» и «Беречь от влаги».

Упаковка

25

Упаковка обеспечивает сохранность мебели от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В качестве транспортной тары могут применяться ящики деревянные или ящики из гофрированного картона. Допускается использовать другую упаковочную тару, в том числе производимую на предприятии-изготовителе мебели.

Влажность древесины тары, в которую упаковывается мебель, не должна превышать 22%.

При отгрузке мебельных изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Транспортировка

Транспортирование мебели осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Размещение и крепление изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия перевозки в части действия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 при температуре от -50 до +50 °С, относительной влажности до 80%, механических – по группе Д ГОСТ Р 51908.

Хранение

Мебель хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре от 10 до 40 °С, относительной влажности до 75%. Условия хранения должны исключать воздействие влаги и агрессивных сред.

5.6 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантируется, что изделие не имеет дефектов, связанных с производством и качеством производственных материалов. Любая дефектная часть будет заменена, если не производилось вмешательства в устройство изделия и изделие надлежащим образом эксплуатировалось во время этого периода.

5.7 Сведения об утилизации

Мебель и материалы, используемые при ее изготовлении, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания её срока. Утилизация отходов материалов – согласно СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.7.2790-10 (по классу отходов А).




По вопросам утилизации обращаться: ООО «ХУПФЕР Китчен & Медикал» (ООО «ХУПФЕР КМ»), 123423, Россия, г. Москва, наб. Карамышевская, д.44, 3 этаж, помещение X, комната 3, +7 (495) 640-52-02, info@hupfer.ru.

25
По вопросам рекламаций обращаться: ООО «ХУПФЕР Китчен & Медикал» (ООО «ХУПФЕР КМ»),
123423, Россия, г. Москва, наб. Карамышевская, д.44, 3 этаж, помещение X, комната 3, +7 (495) 640-
52-02, info@hupfer.ru.


Приложение А к Руководству по эксплуатации

Внимание! Размеры в чертежах указаны без допуска!


Чертежи моделей стола:

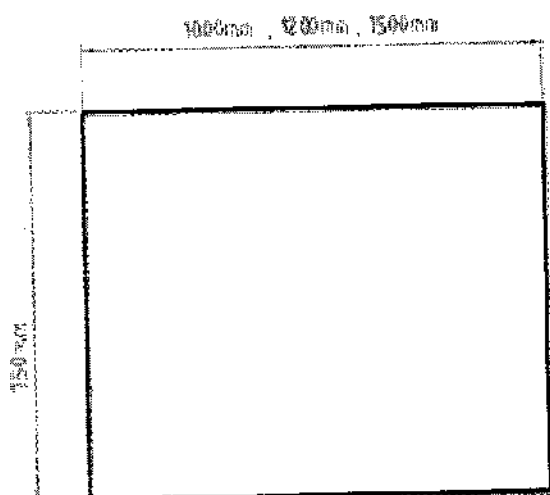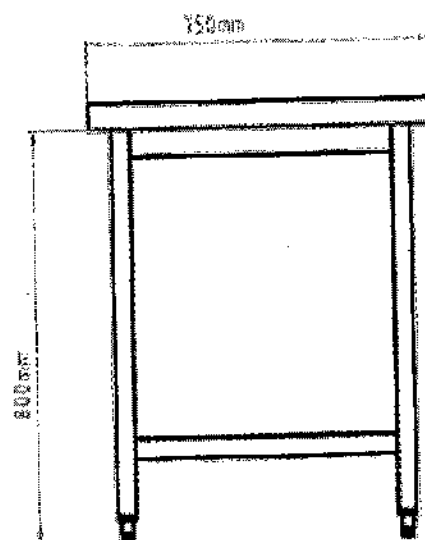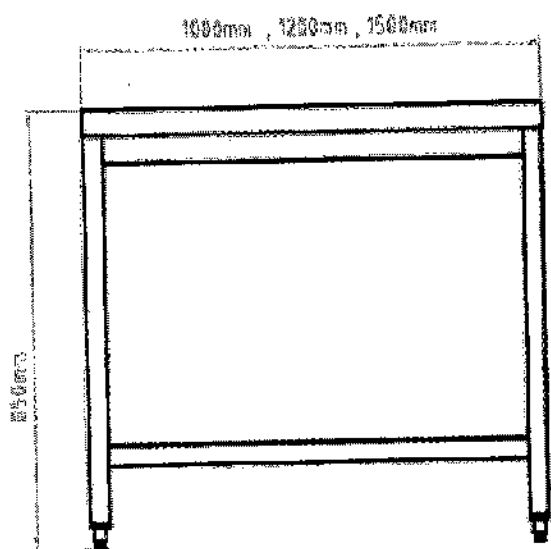


Стол стационарный АТ-О 1,2,3

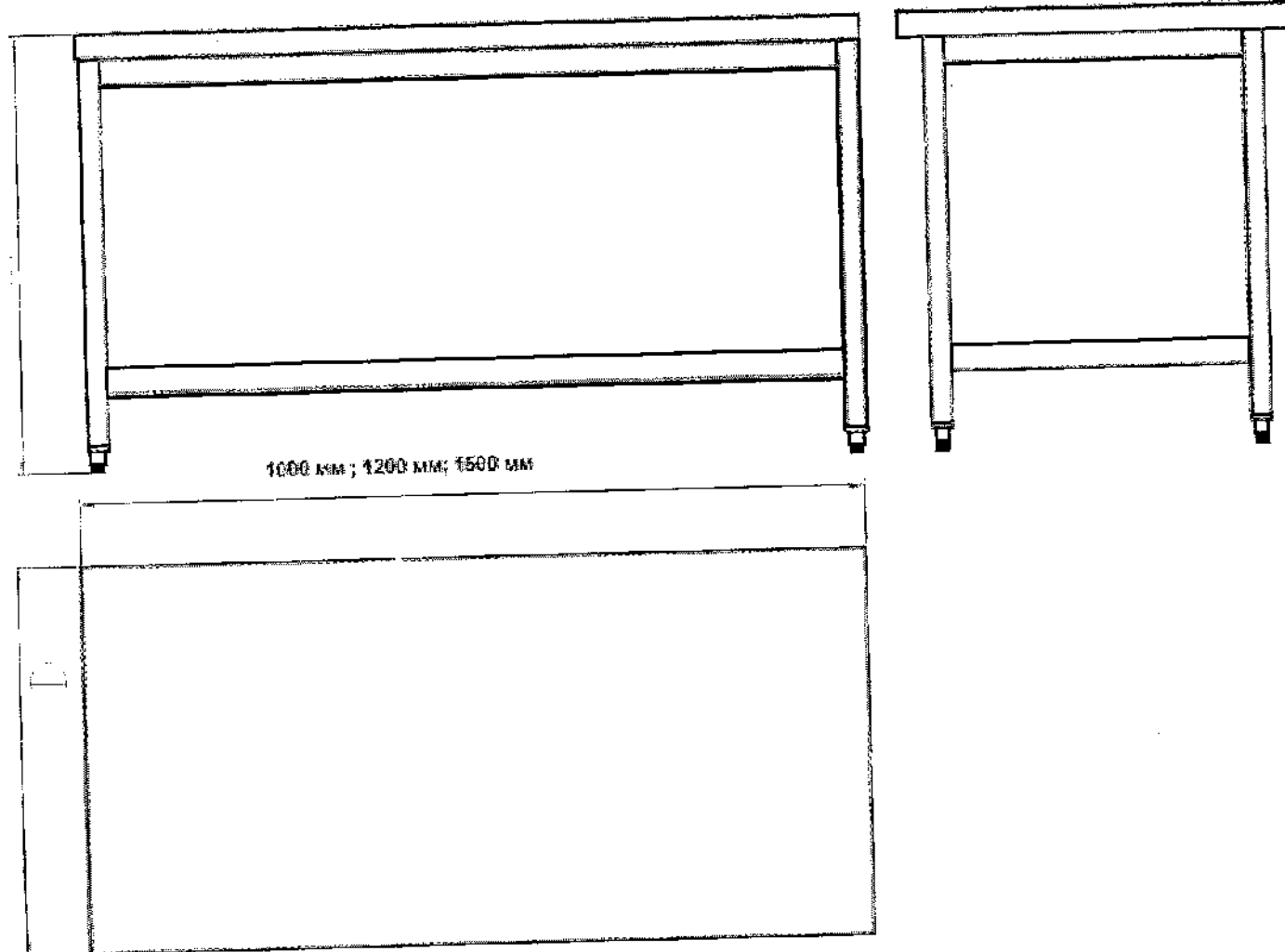


Стол стационарный АТ-З 1,2,3

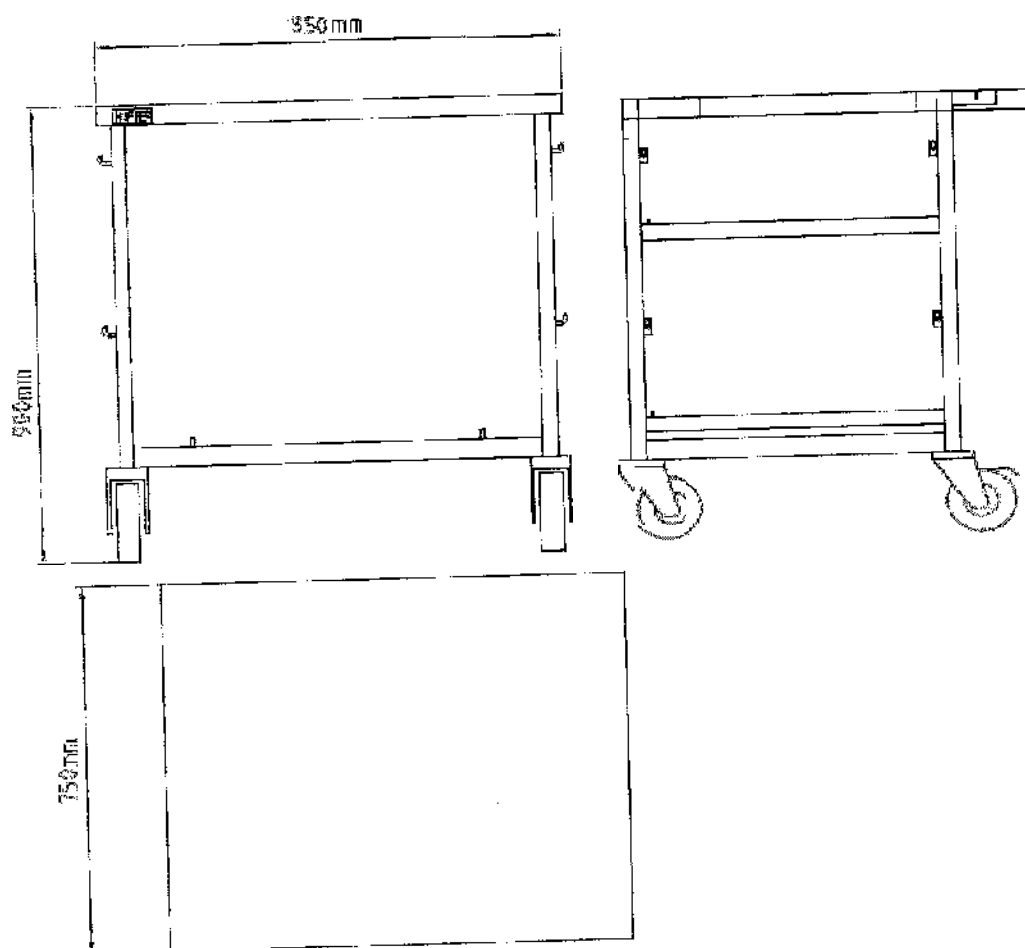


Стол мобильный РТ 1

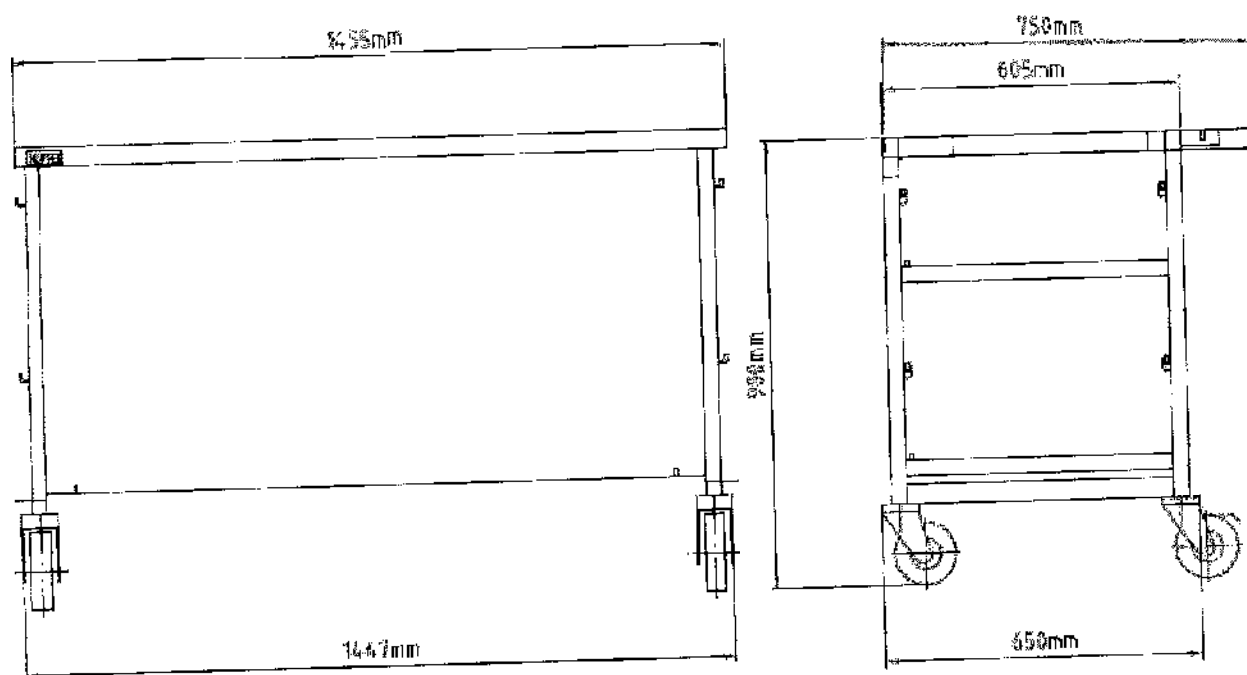




Стол мобильный РТ 2

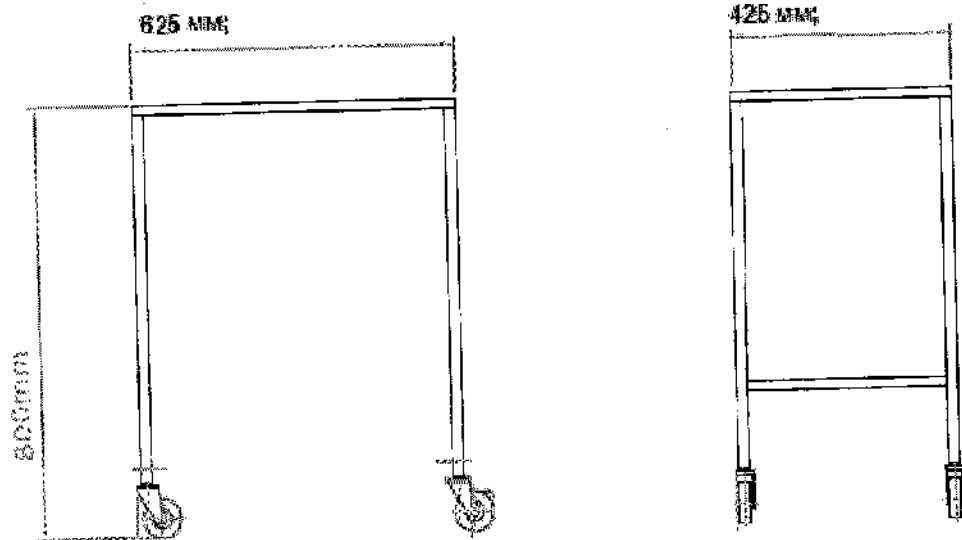


Стол для инструментов IT 1

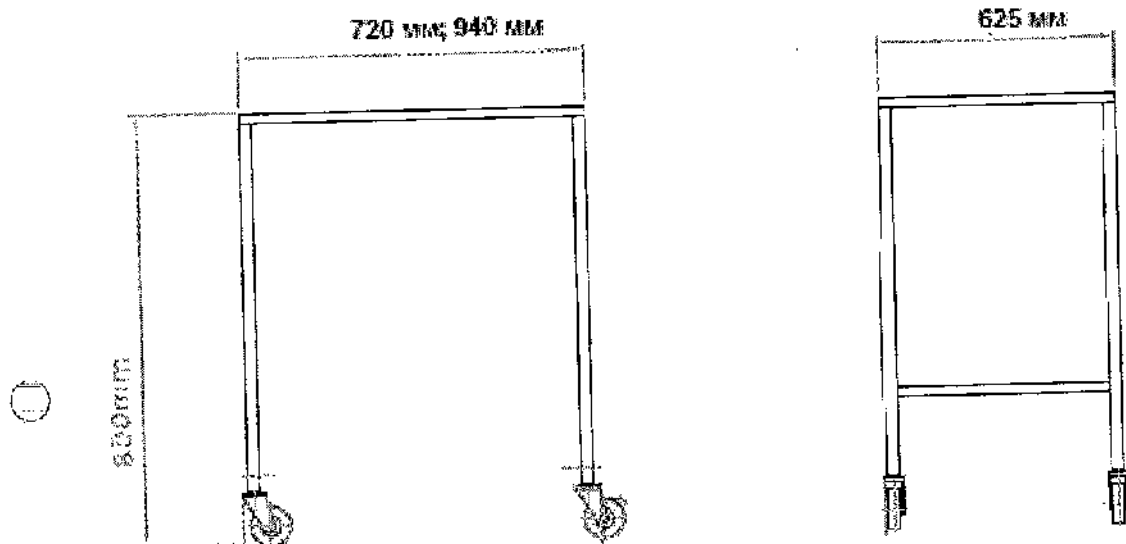

Стол для инструментов IT 2,3

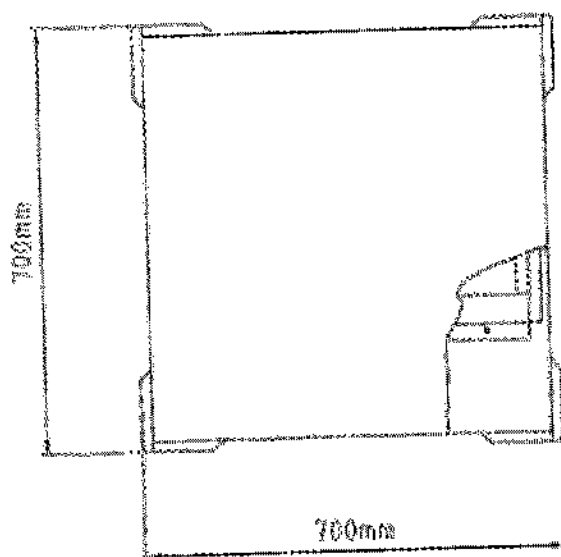
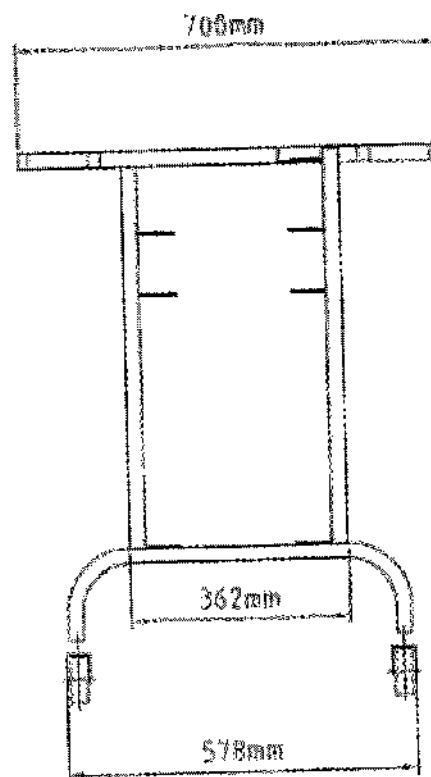
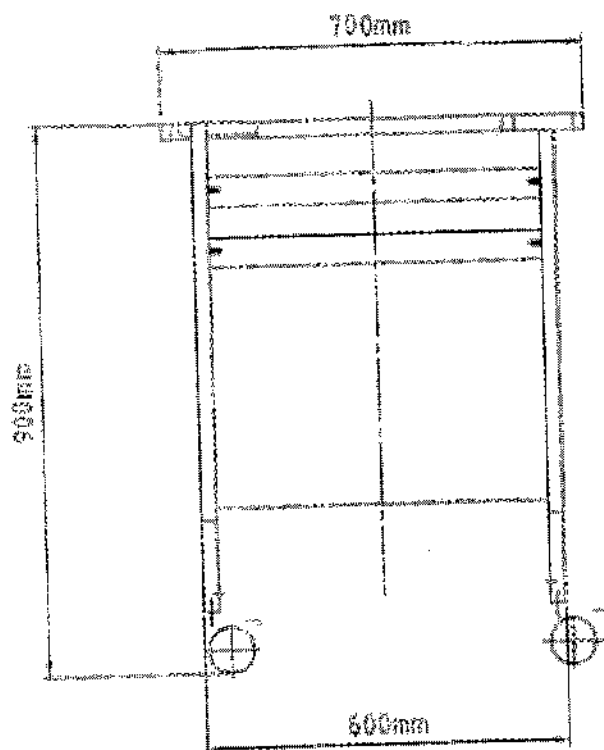


Стол для стерильного материала SBT



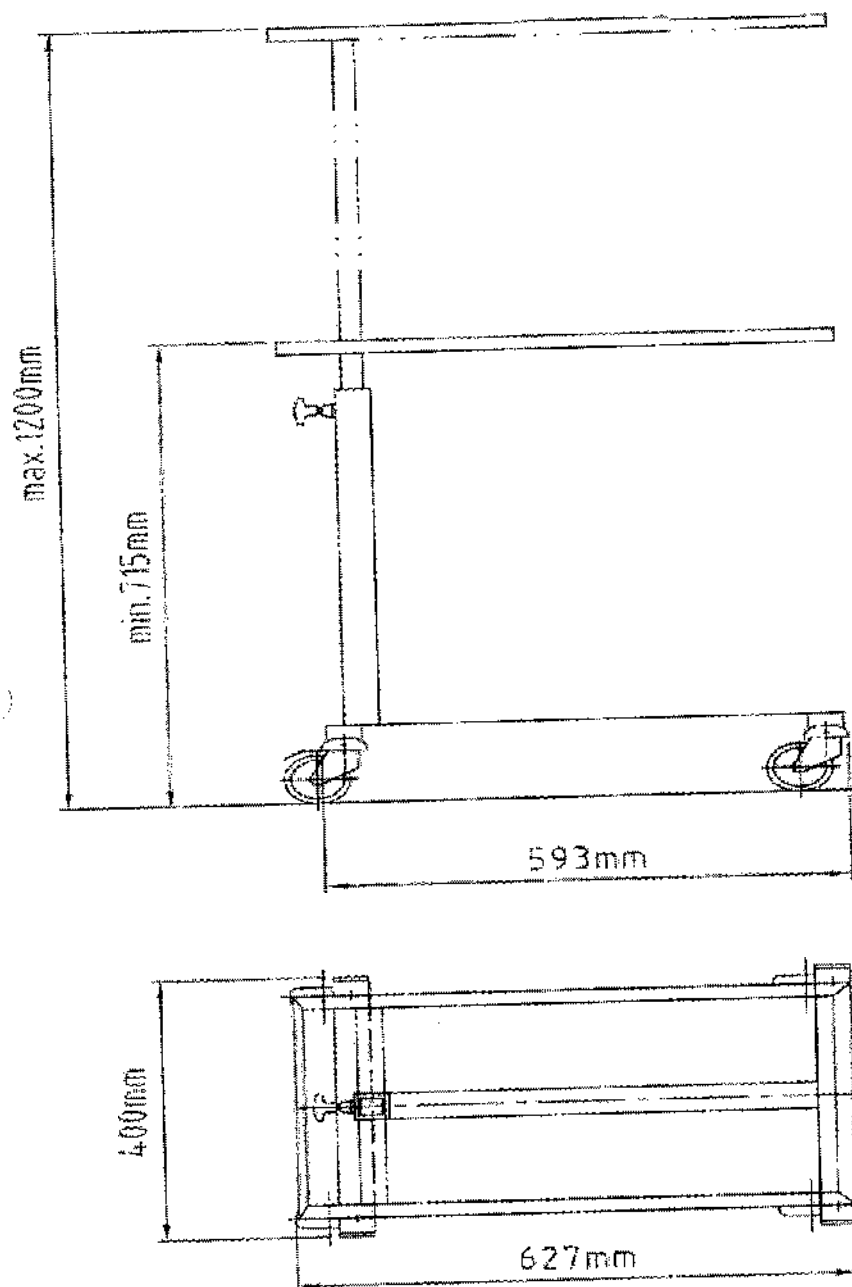


Стол для инструментов Z




Чертежи моделей тележки:

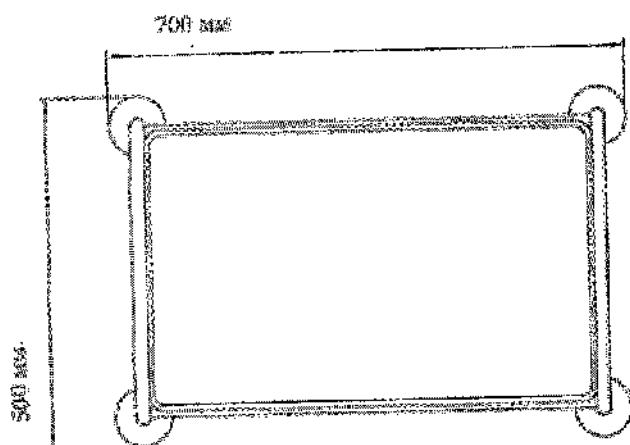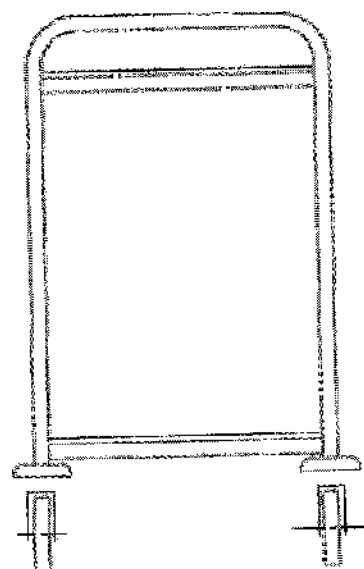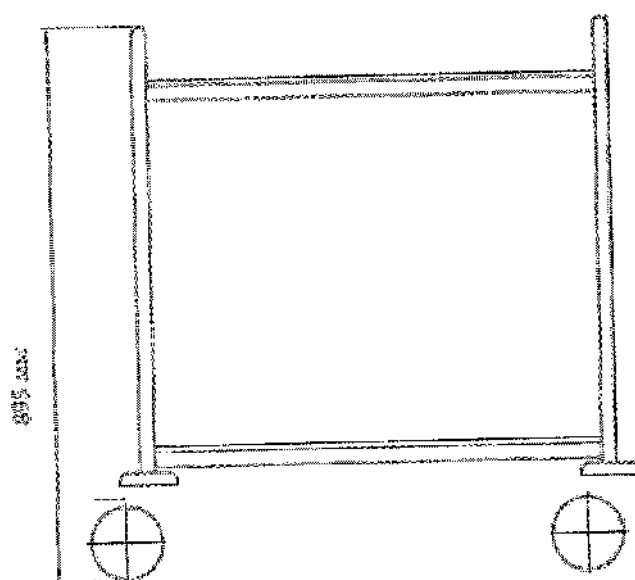


Тележка открытая MSW 1

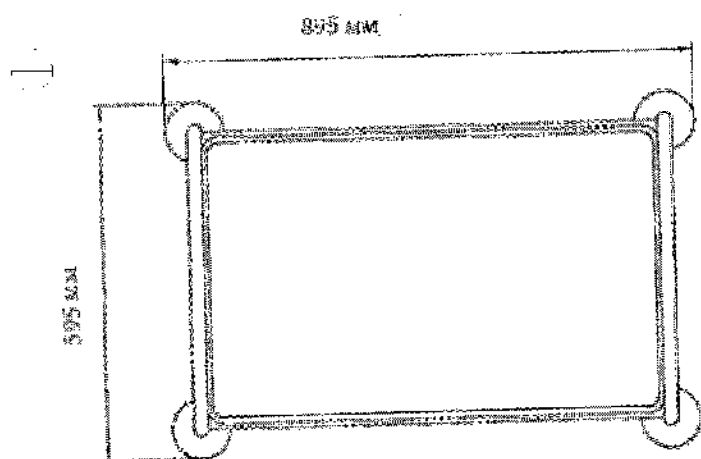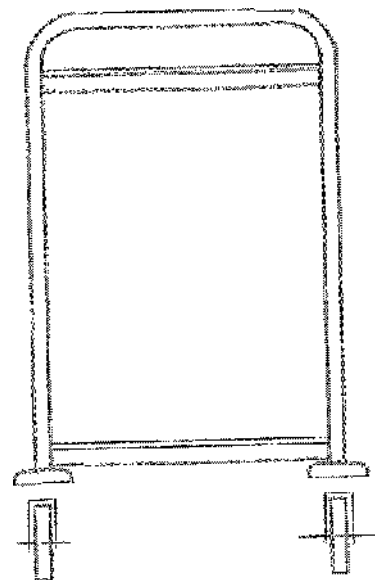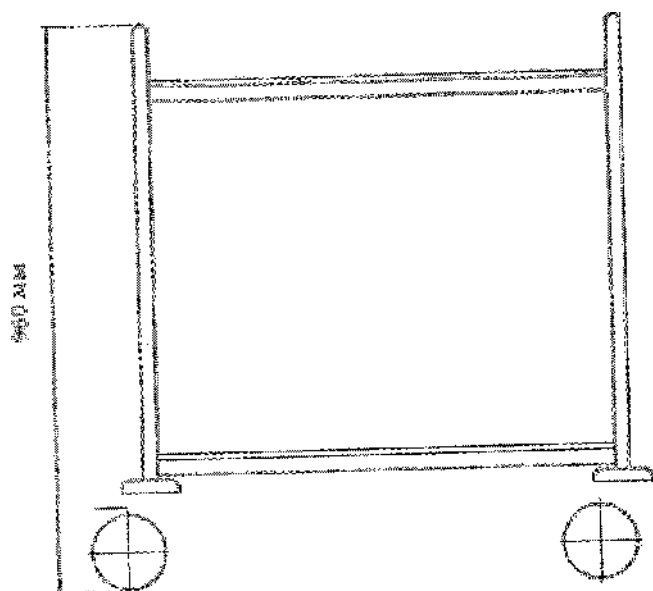


Тележка открытая MSW 2

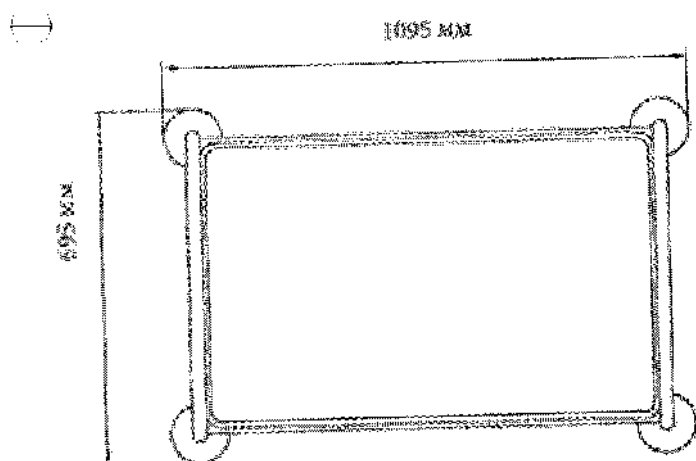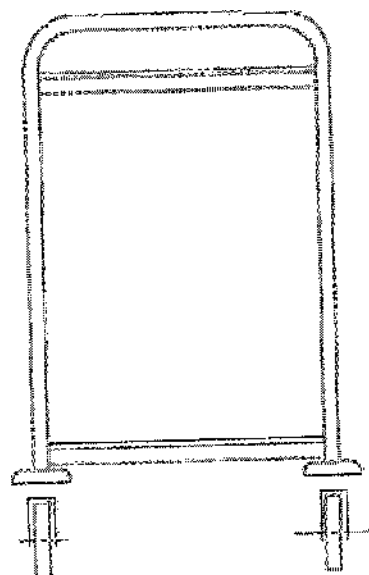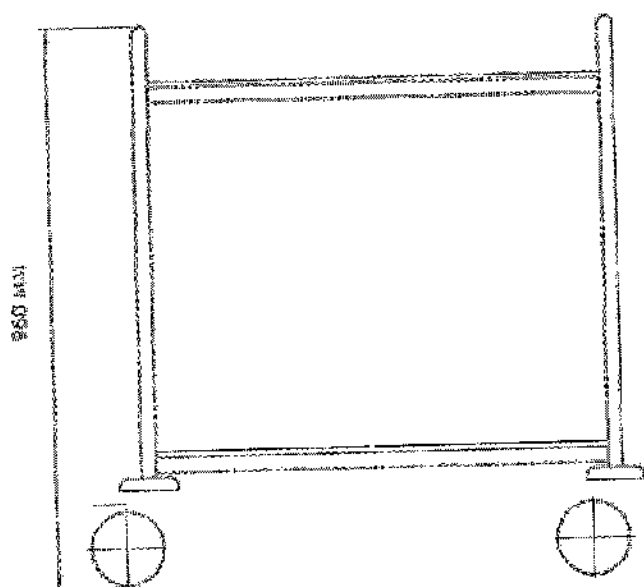


Тележка открытая MSW 3

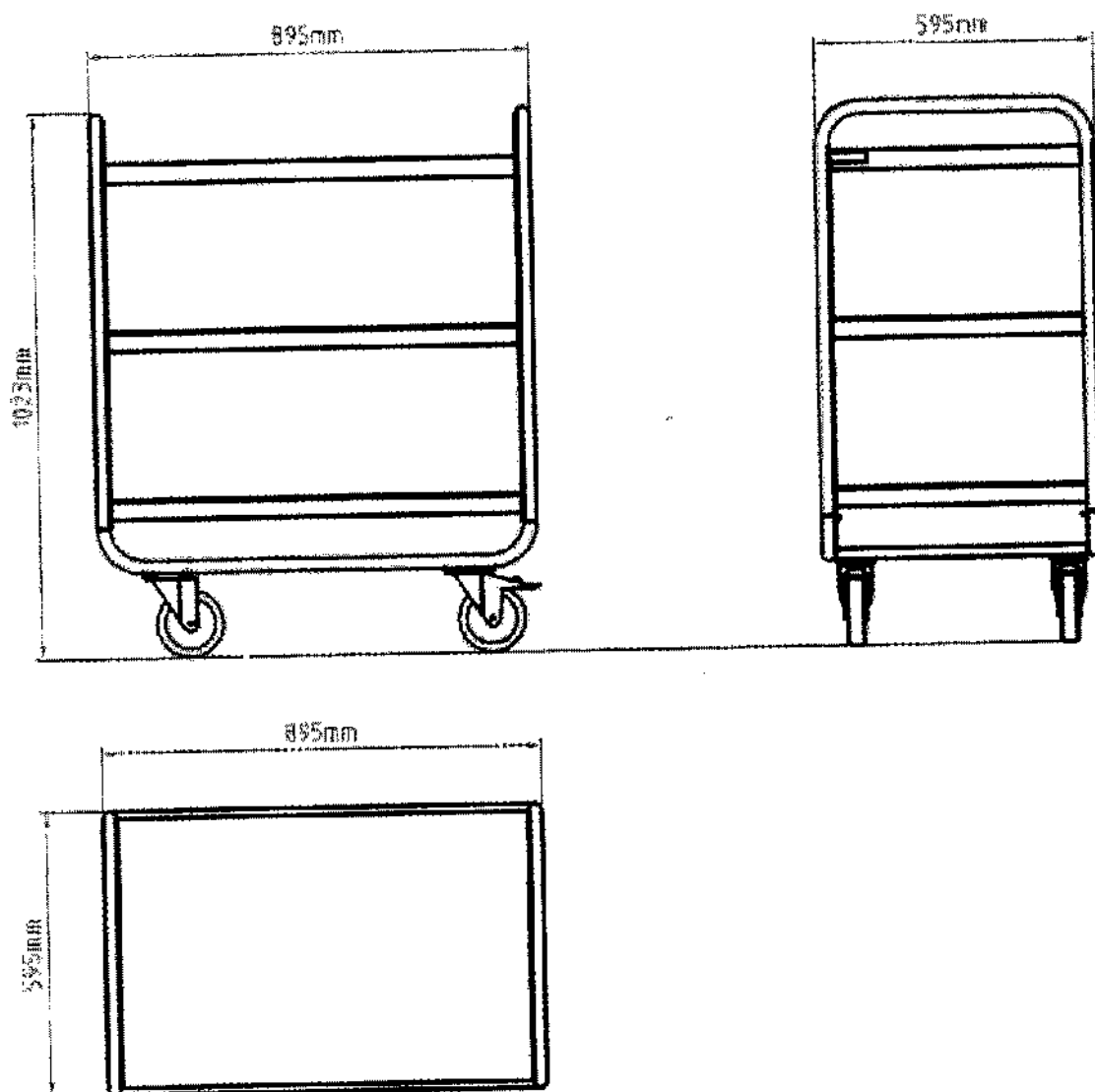


○ Тележка открытая MSSW 1

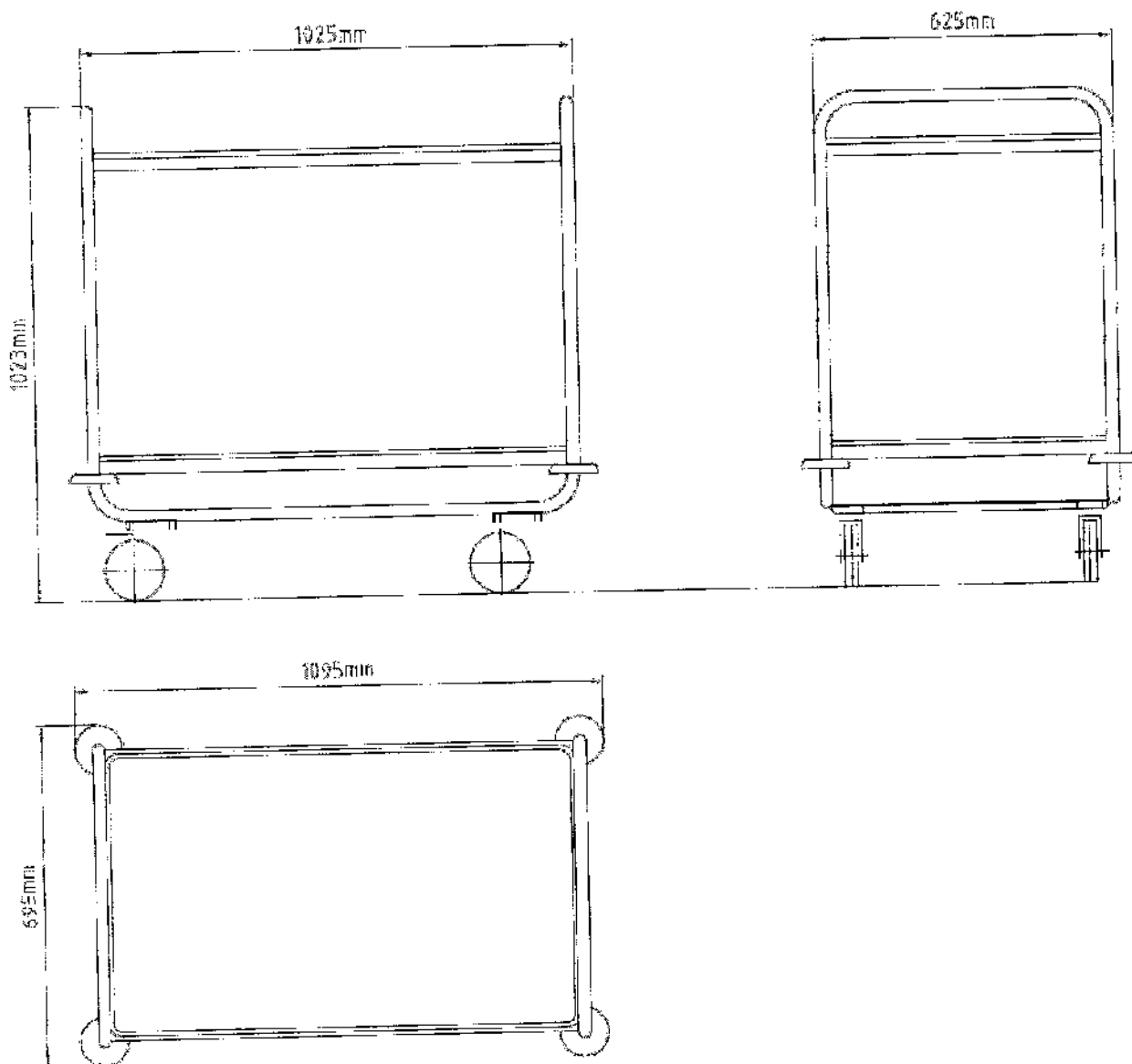


Тележка открытая MSSW 2

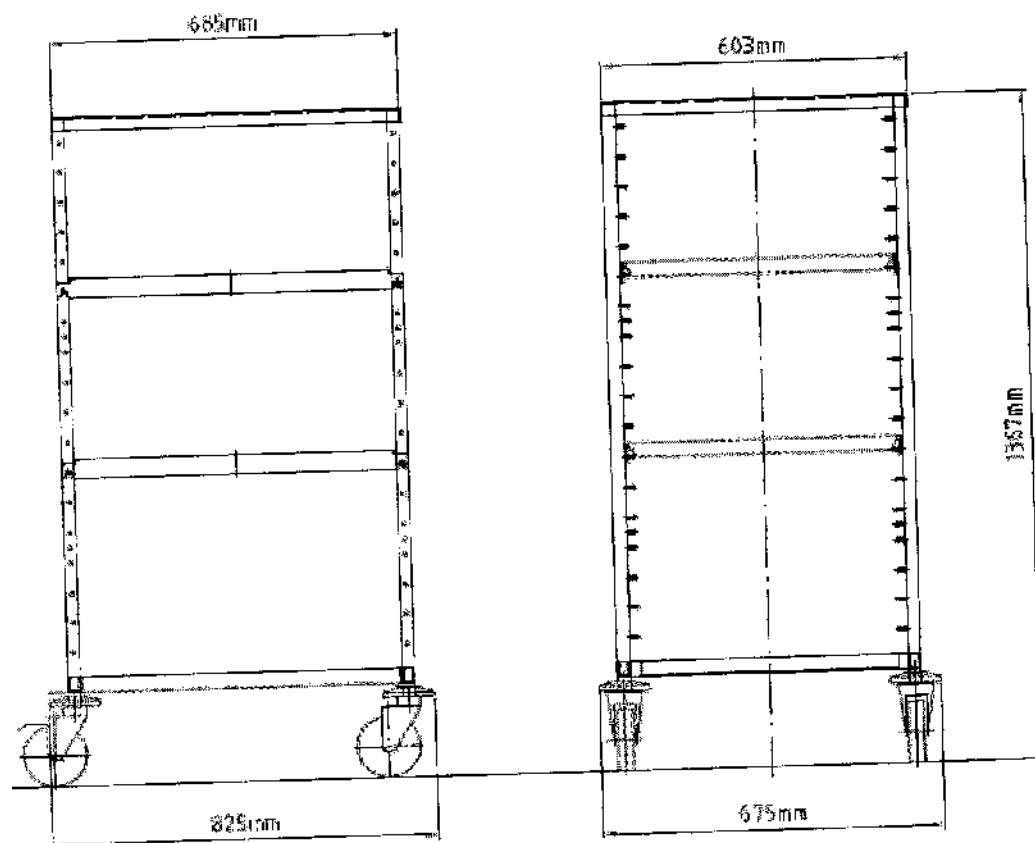


Тележка открытая OSTW 1

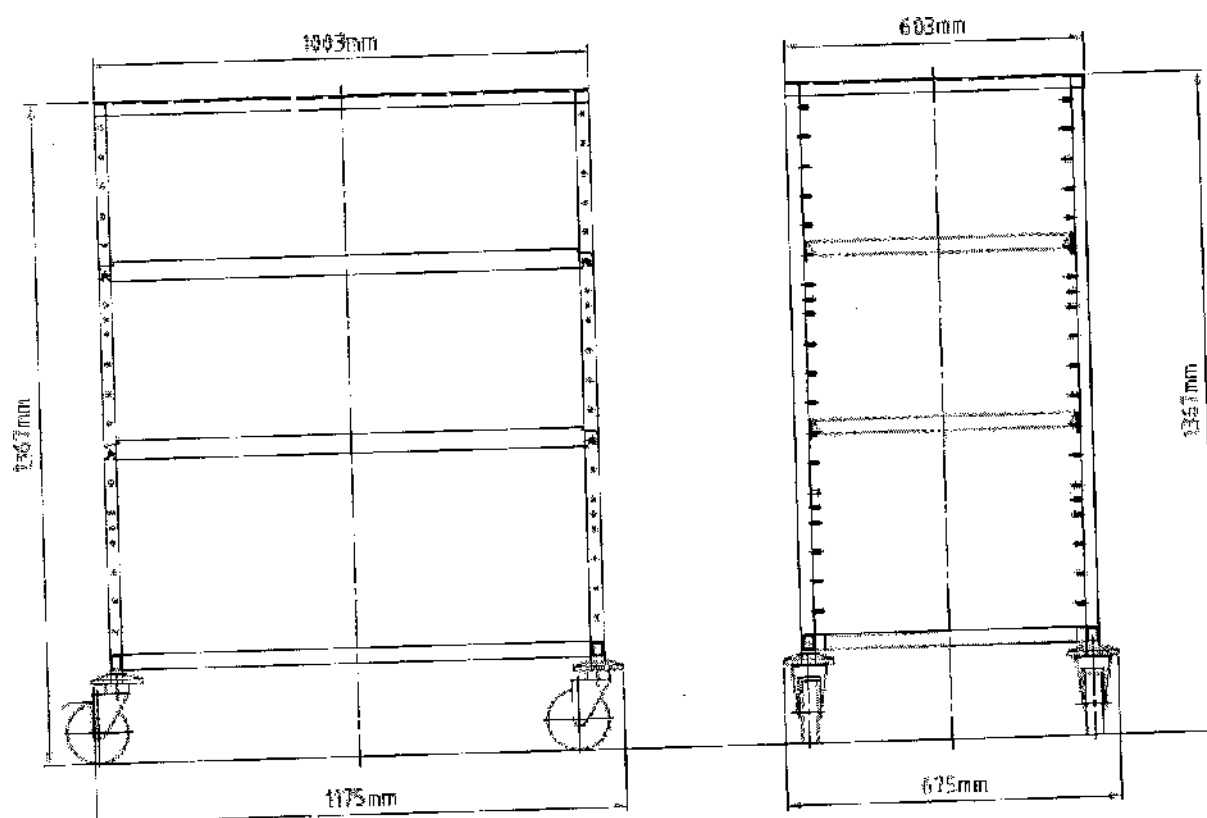


Тележка открытая OSTW 2

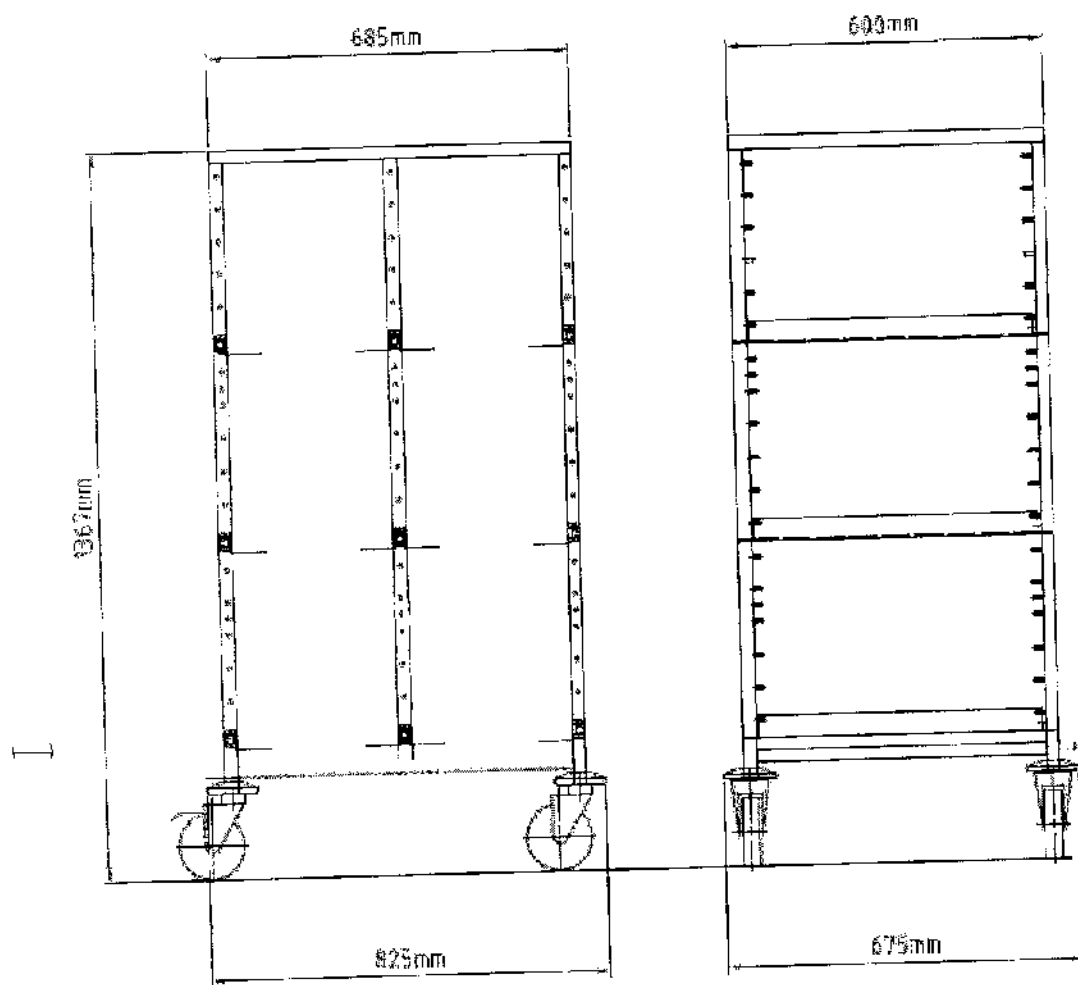


Тележка открытая ОСТW 1

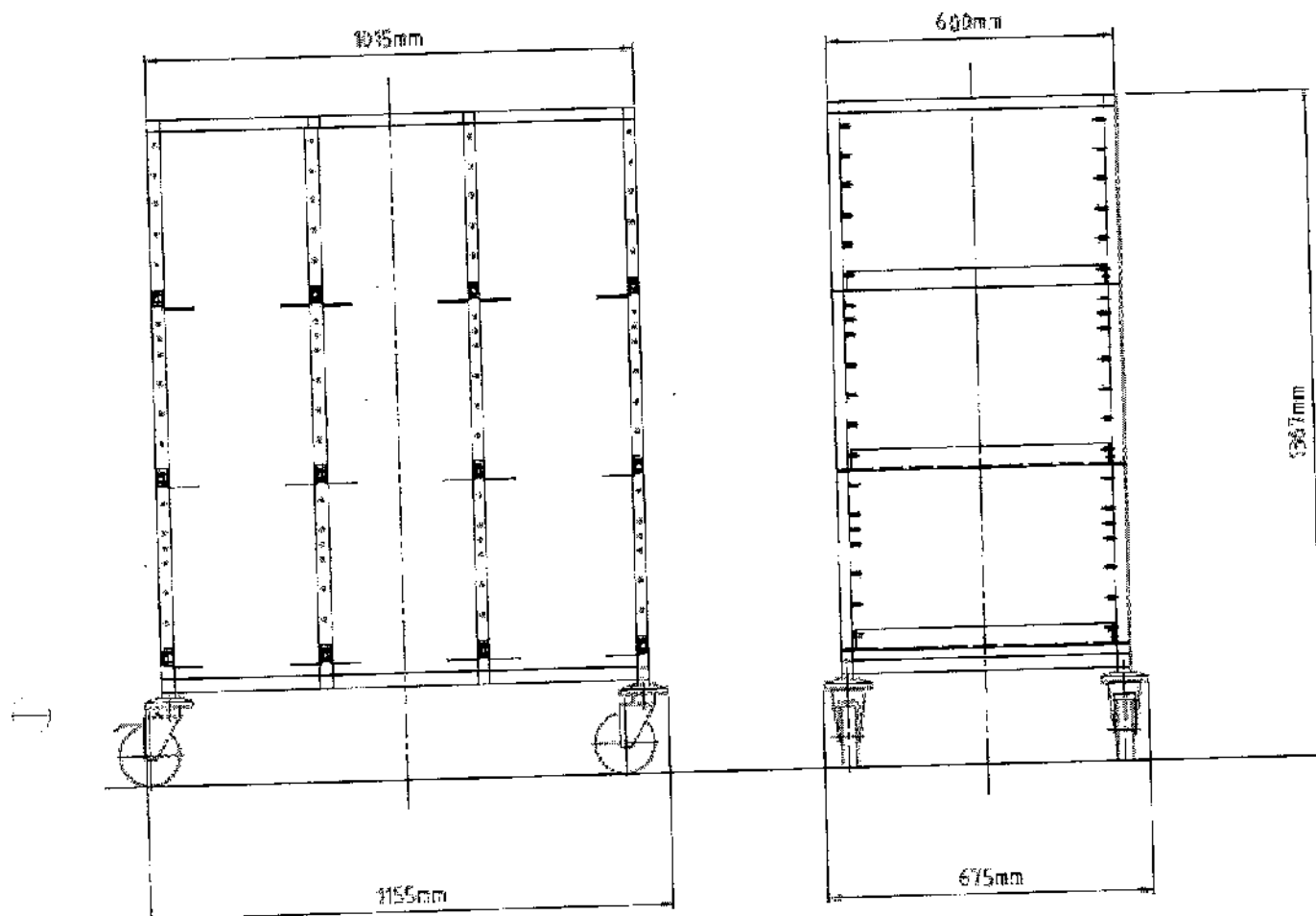


Тележка открытая OCTW 2

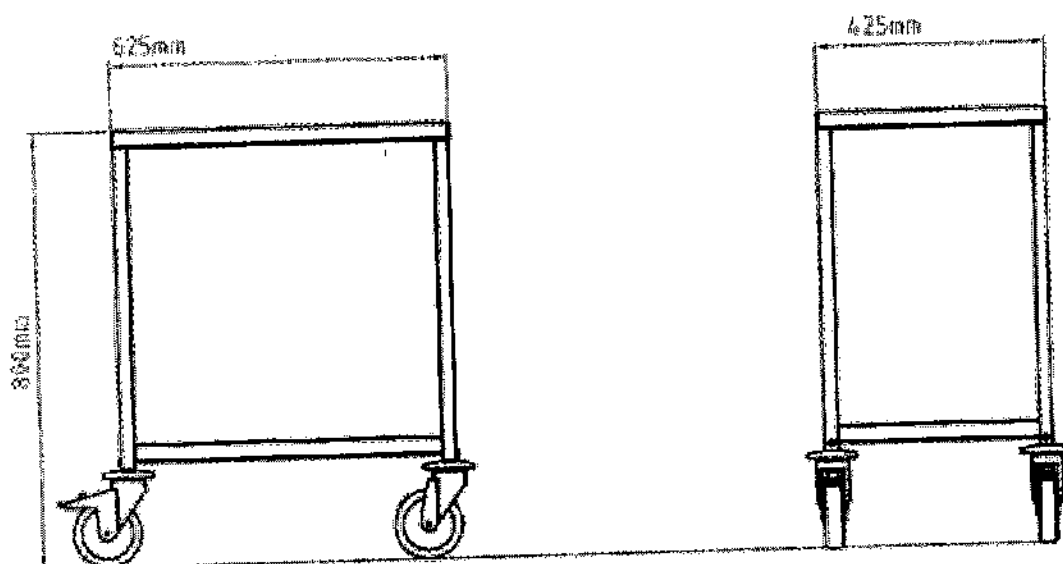


Тележка открытая AZW 1

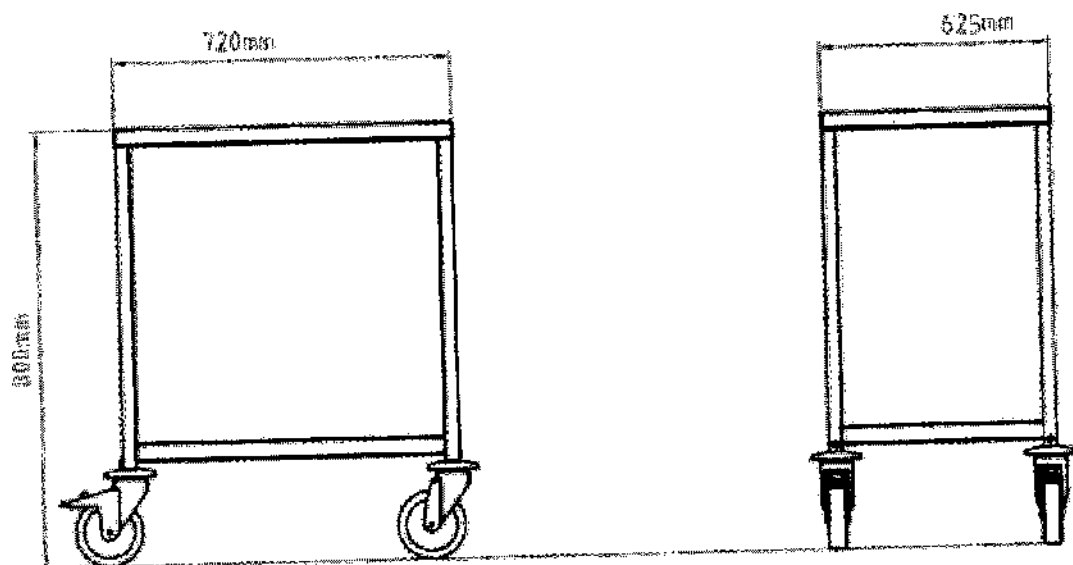


Тележка открытая AZW 2

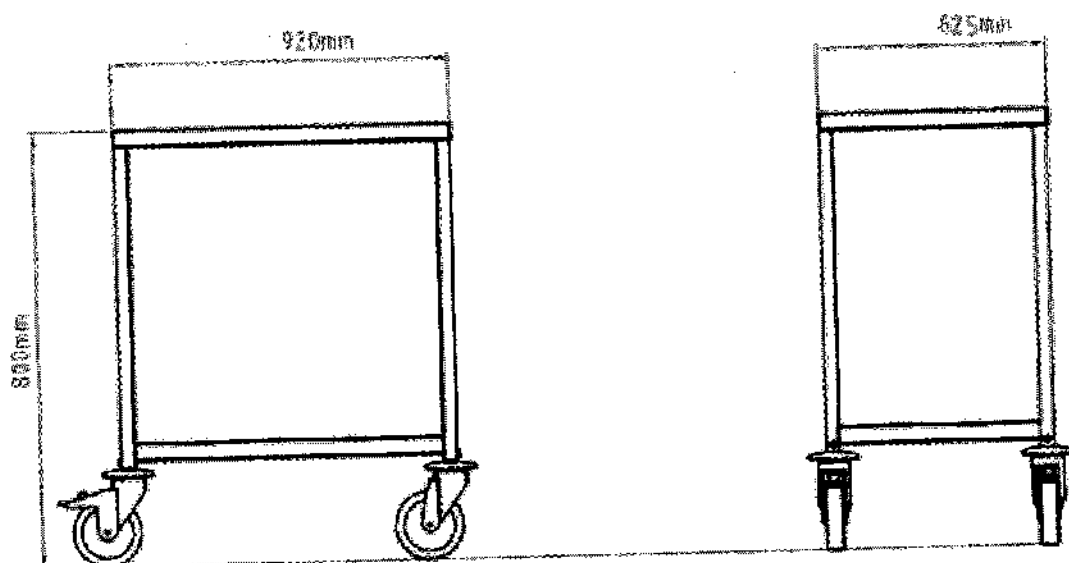


Тележка открытая AZW 3

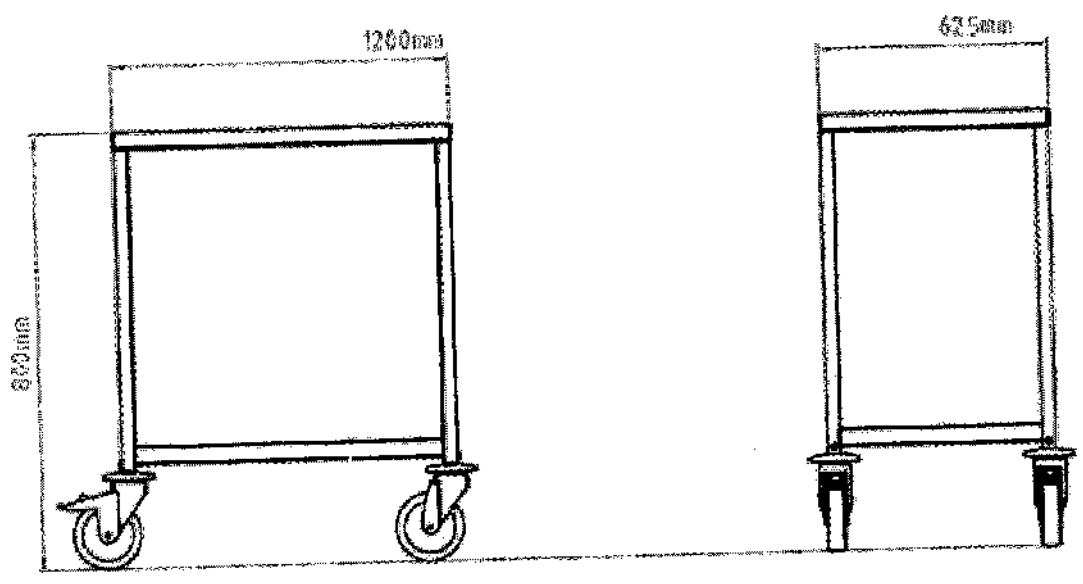


Тележка открытая AZW 4

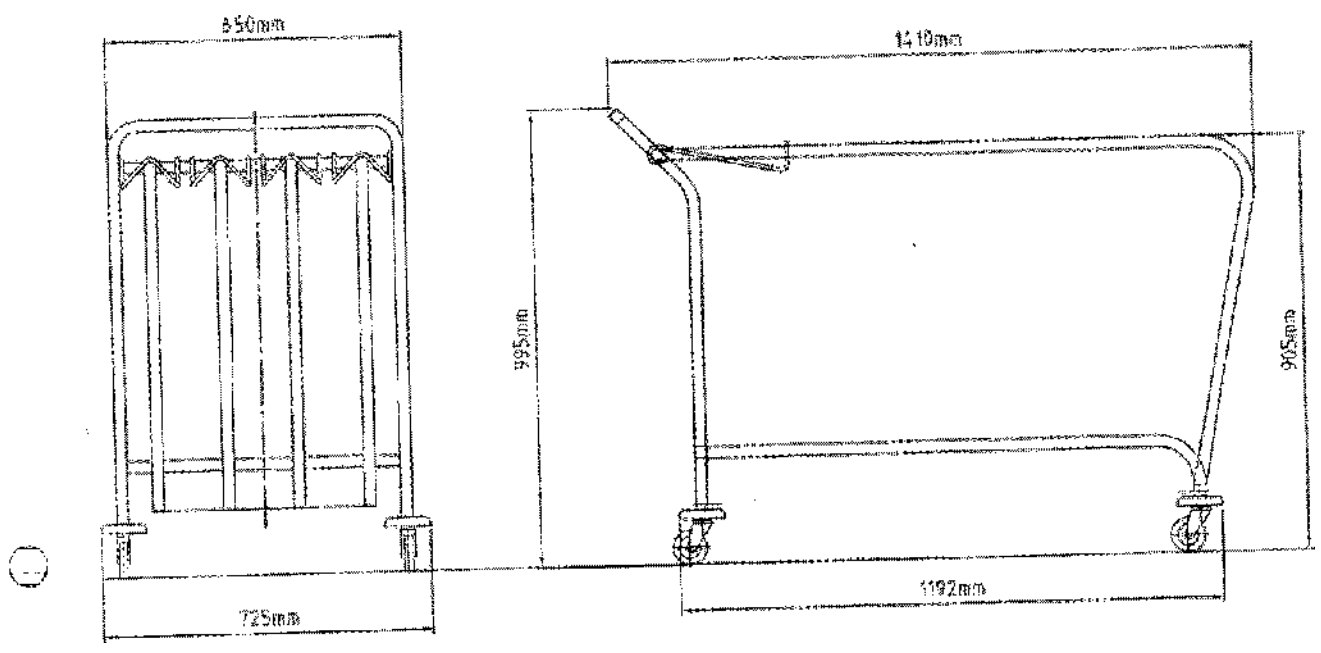


Тележка для бумаги

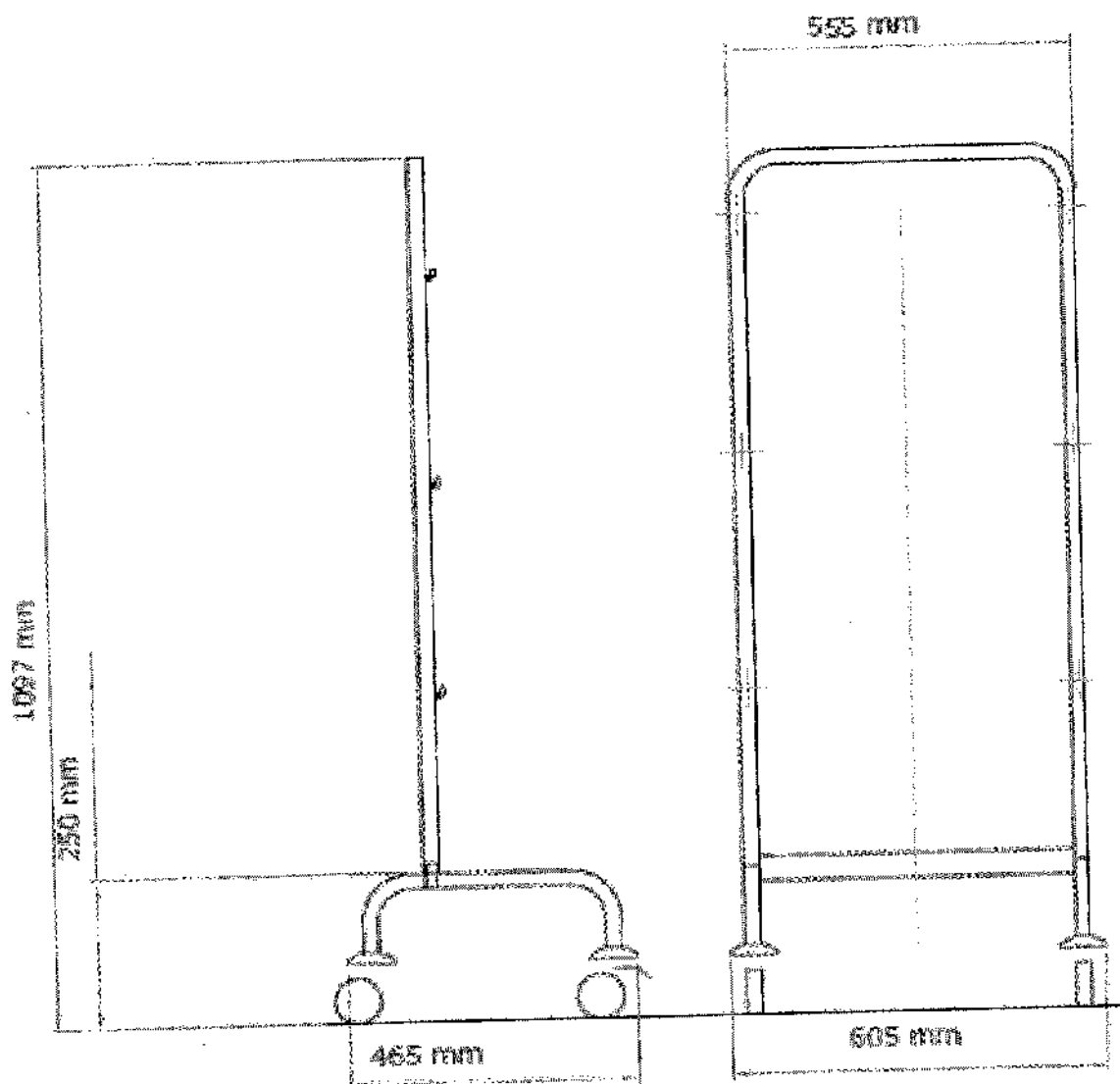


Тележка с кранштейнами 1

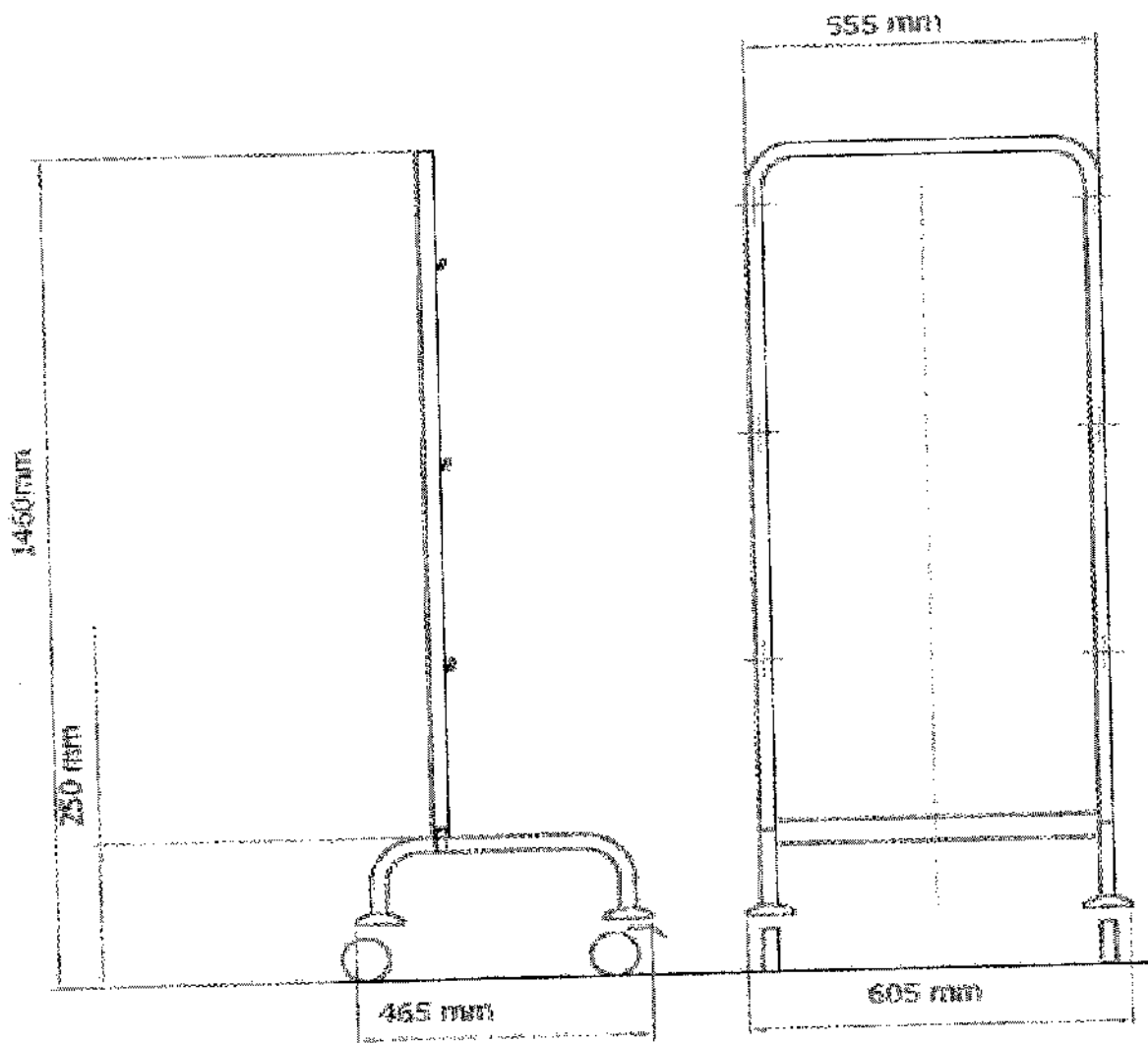


Тележка с кровштейнами 2

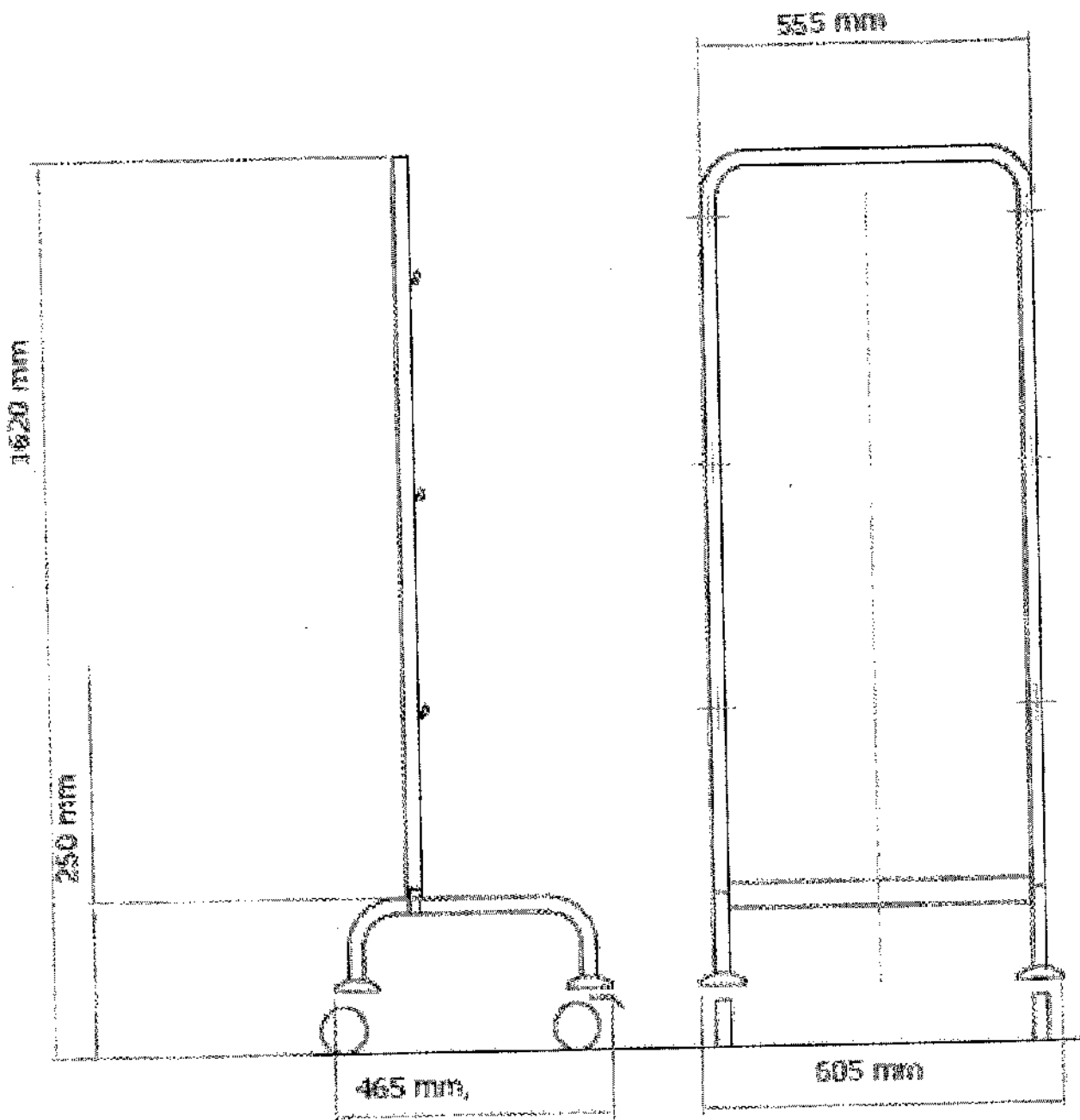


Тележка с кронштейнами 3

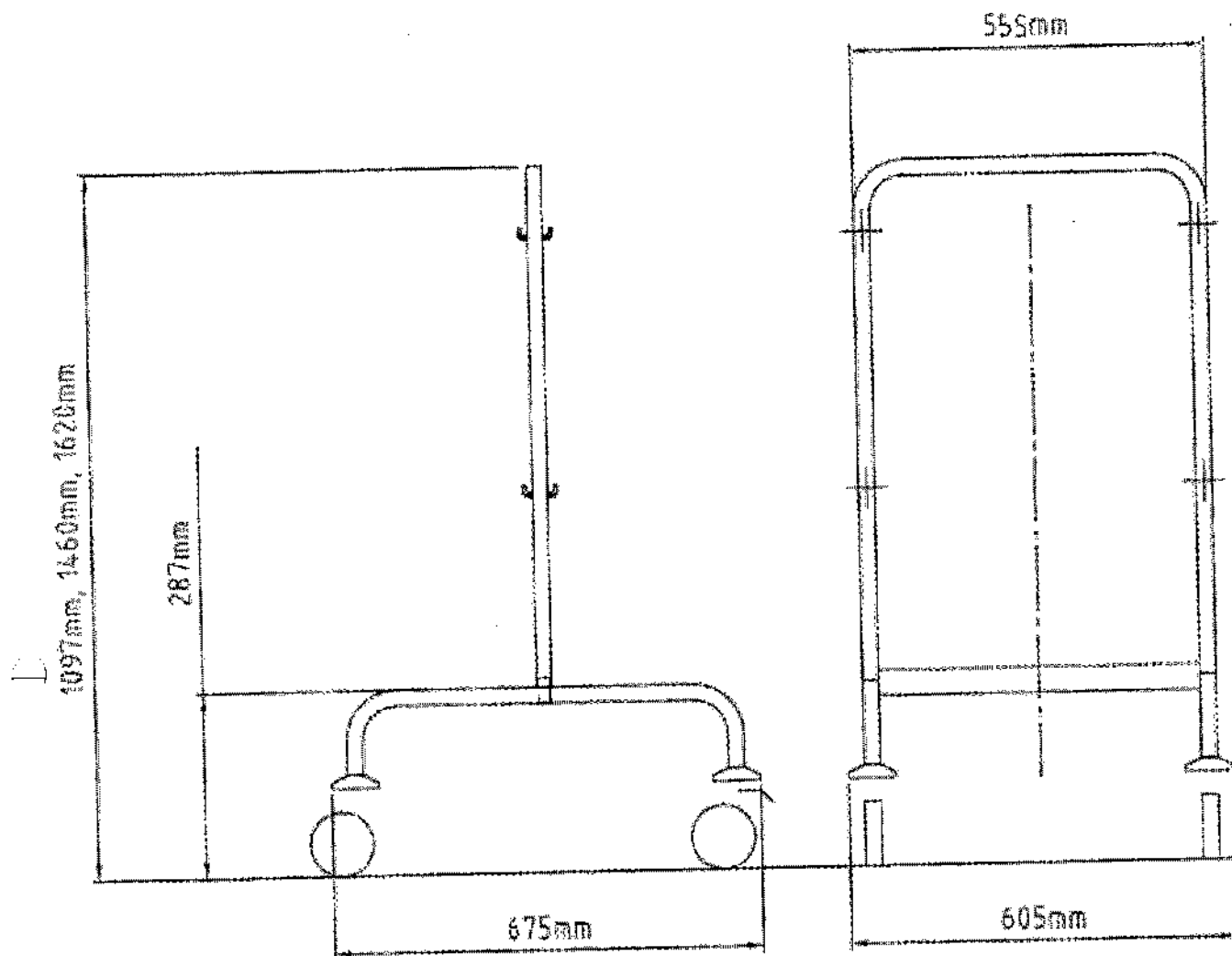


Тележка с кронштейнами 4,5,6

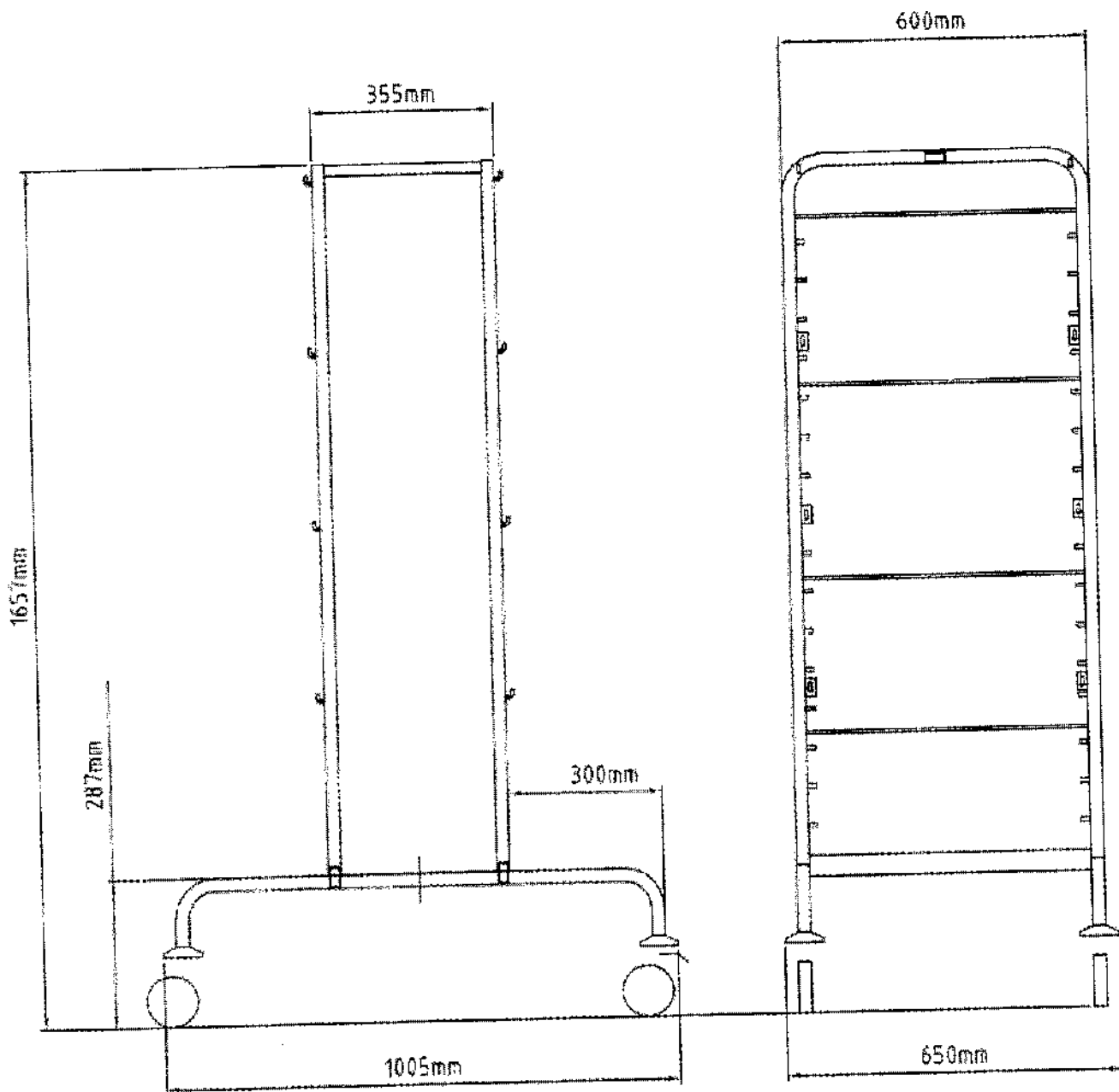


Тележка с кронштейнами MEDIDUL

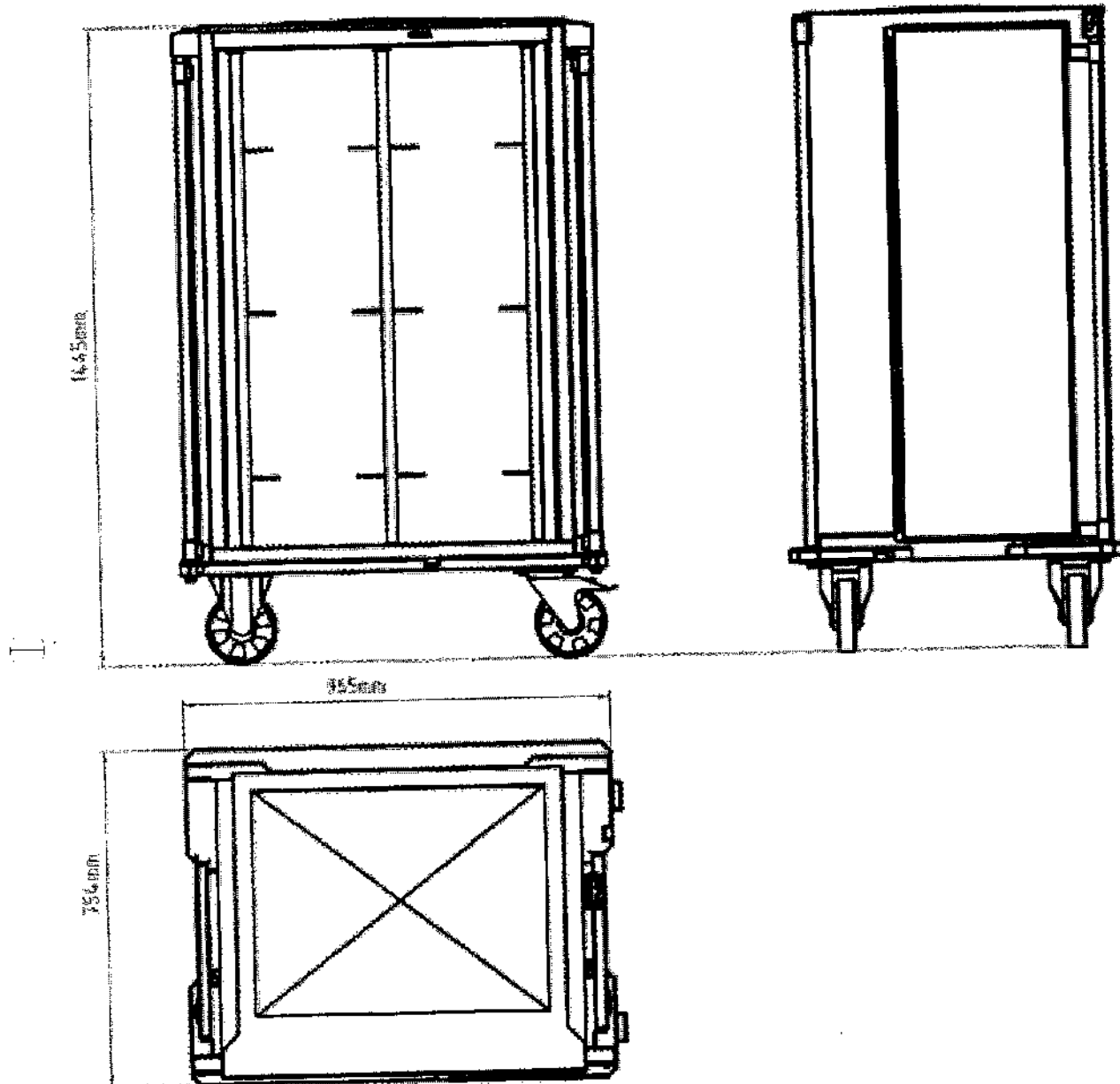


Тележка закрытая СТВ 1

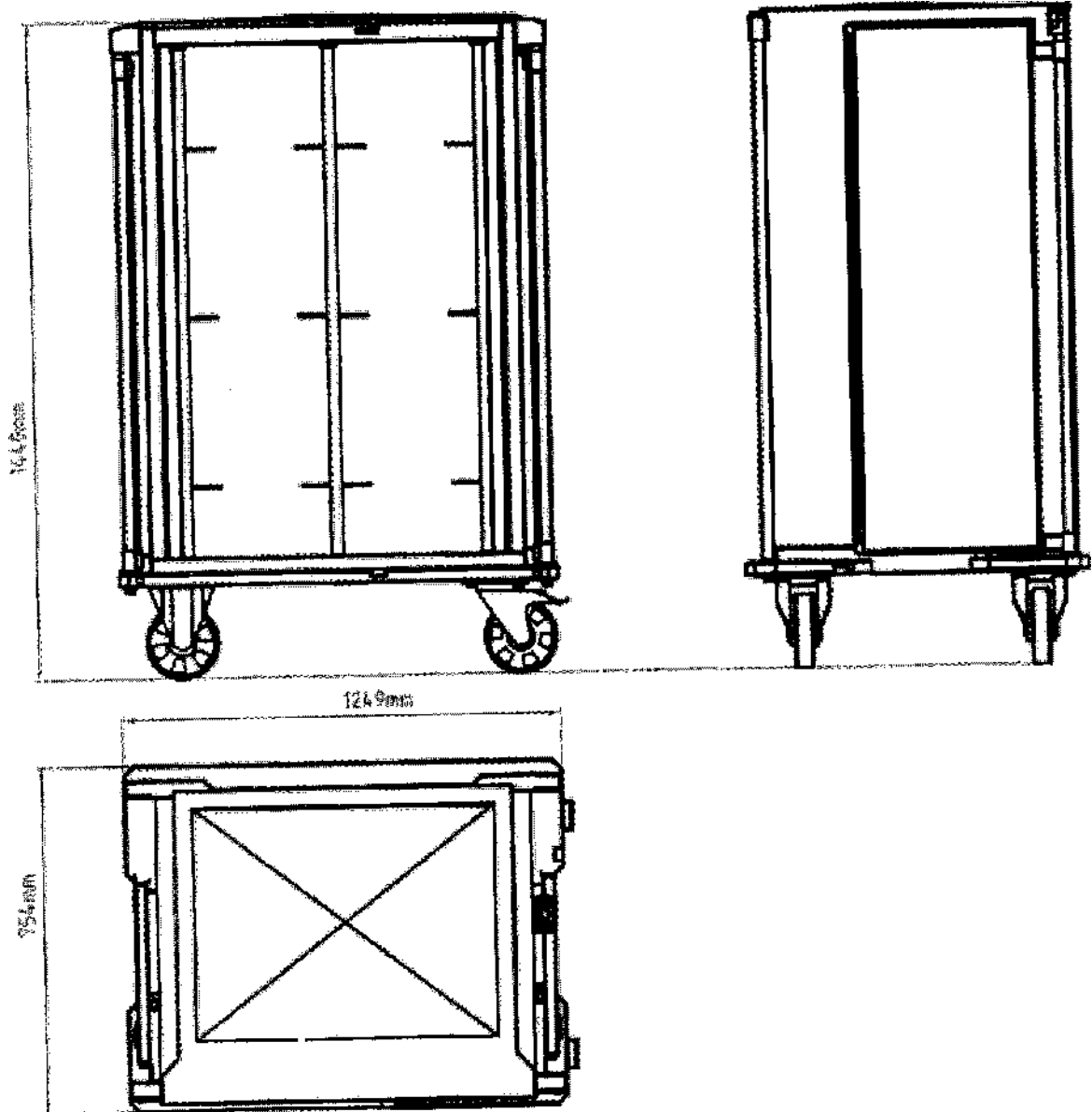


Тележка закрытая СТВ 2

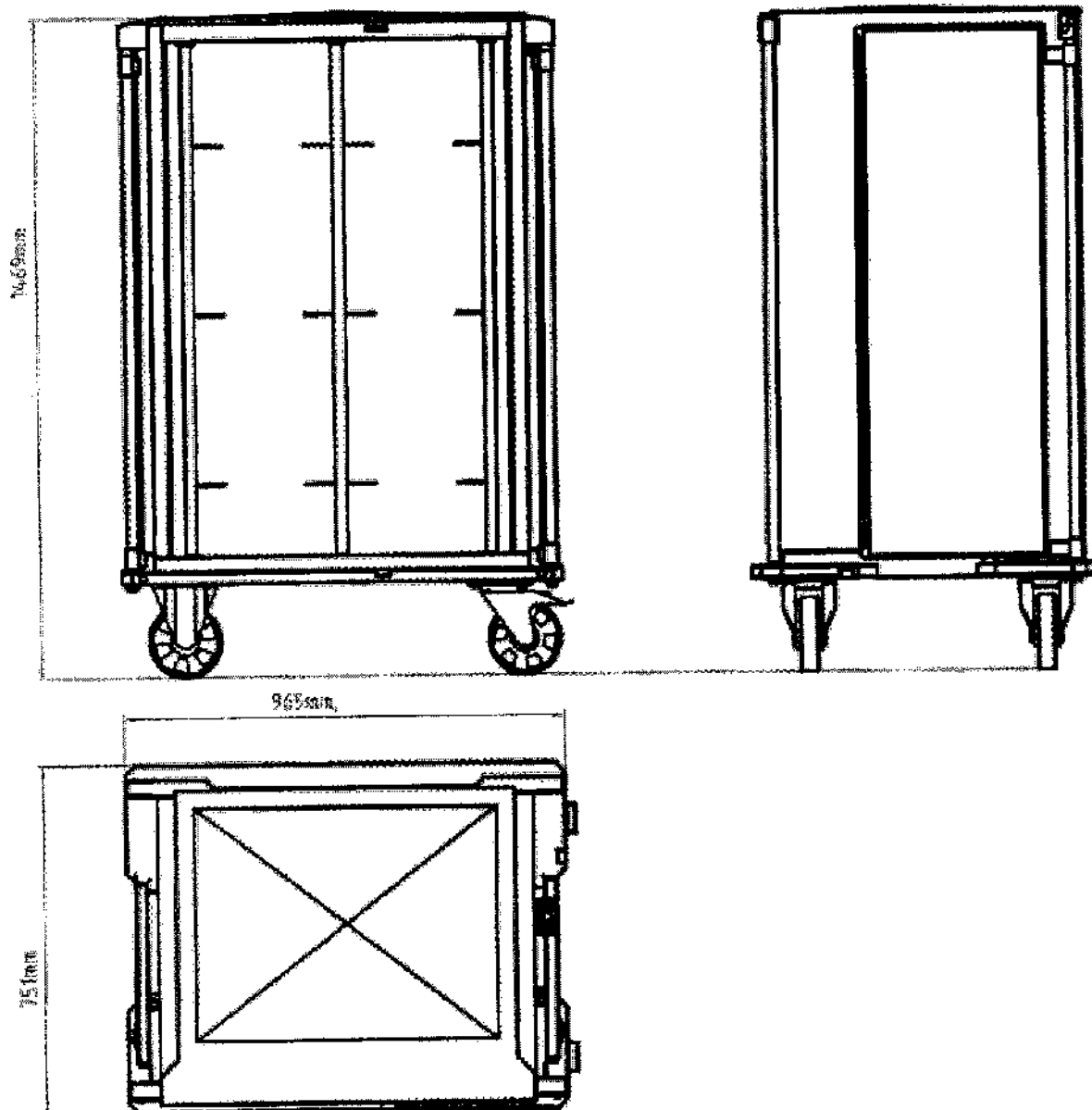


Тележка закрытая СТВ 3

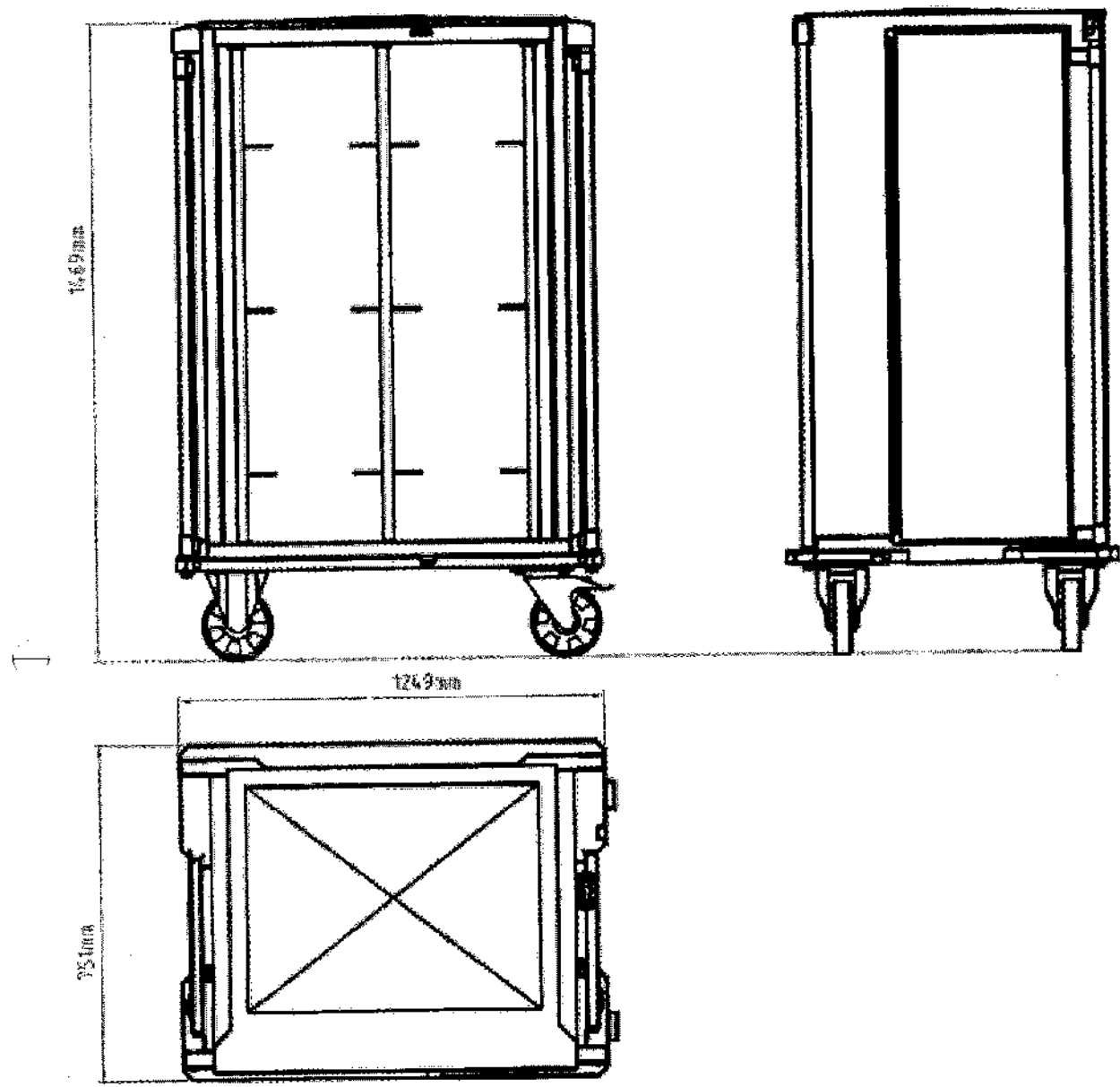


Тележка закрытая СТВ 4

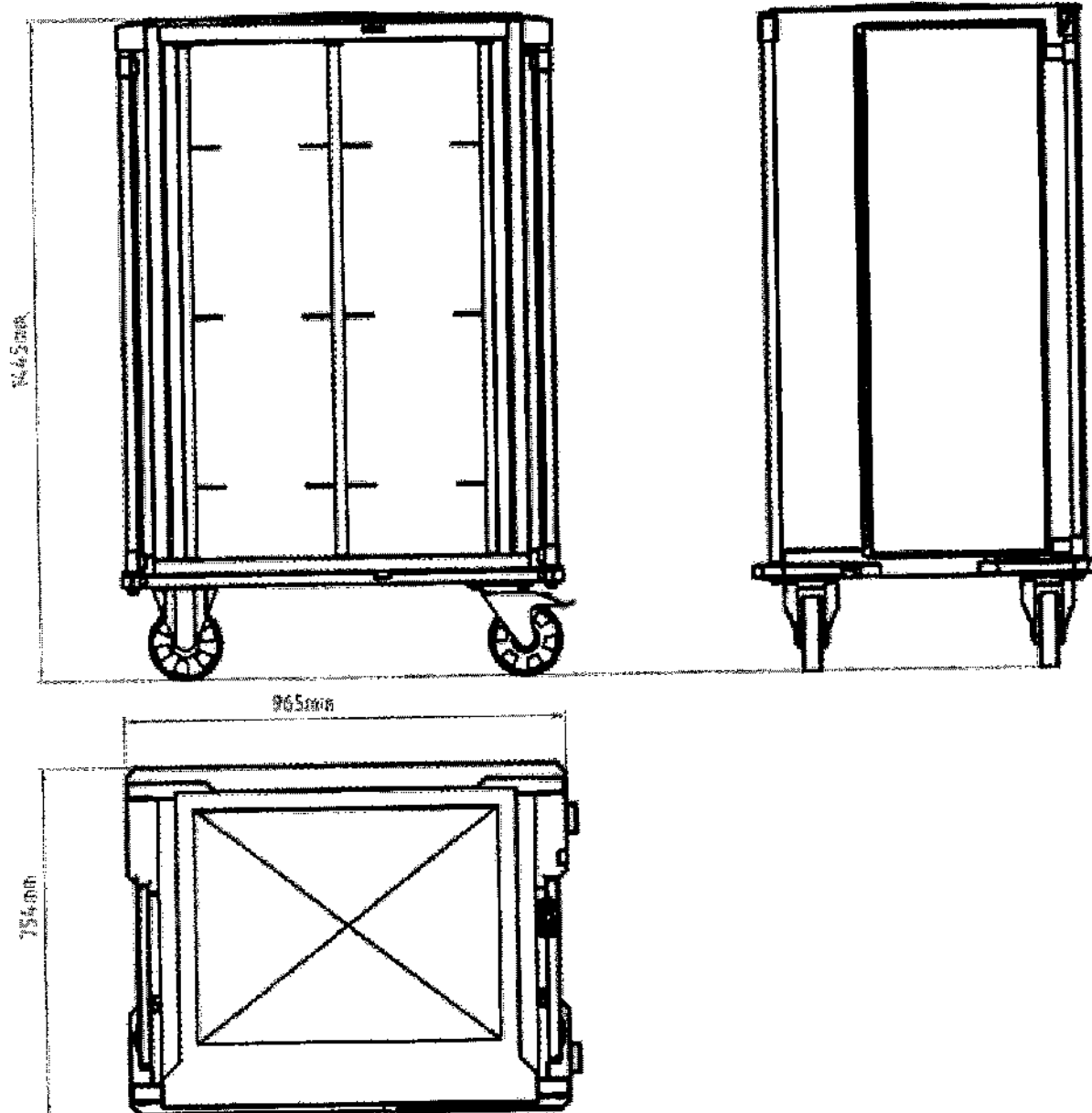


Тележка закрытая STW 1

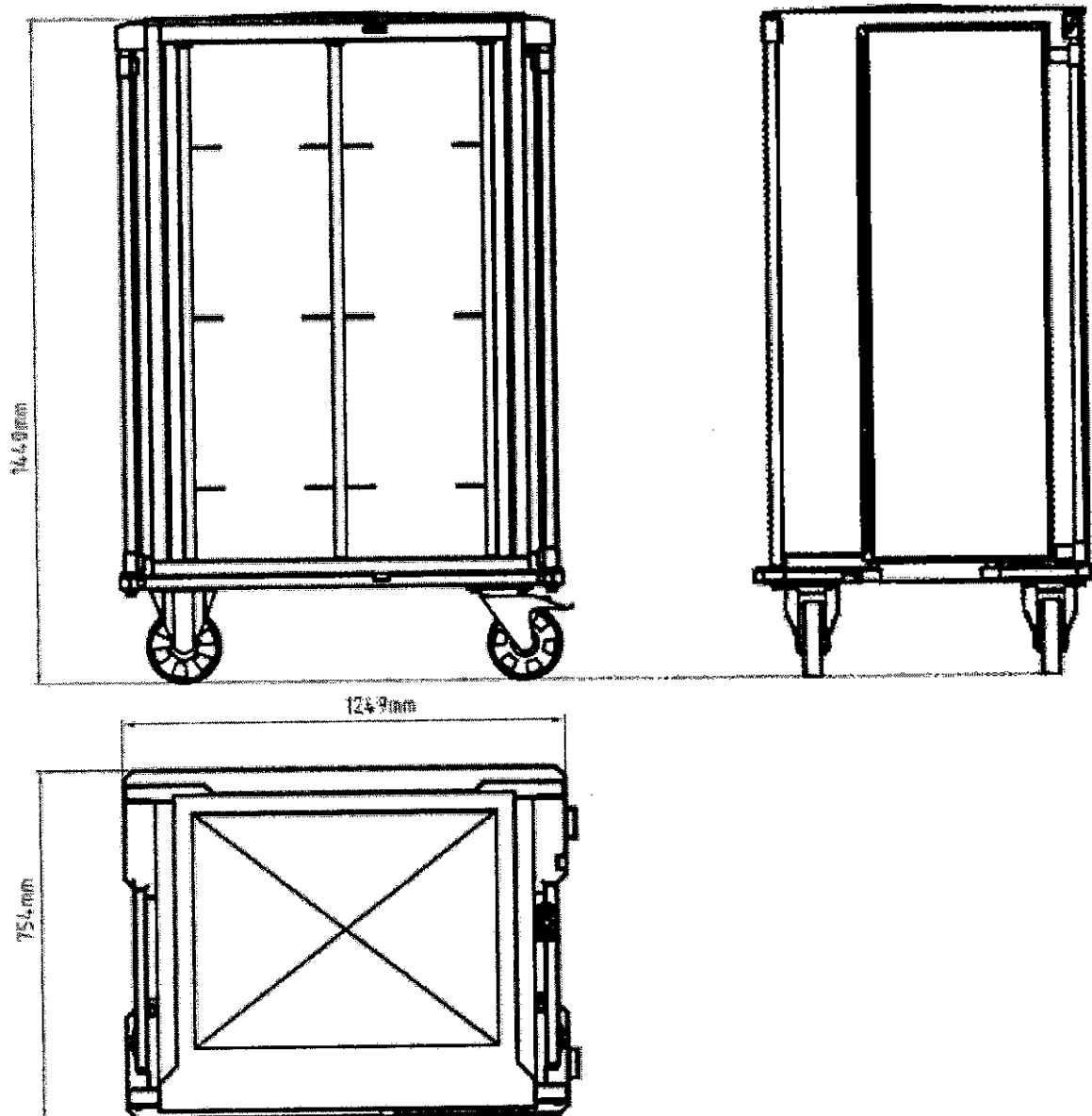

Тележка закрытая STW 2


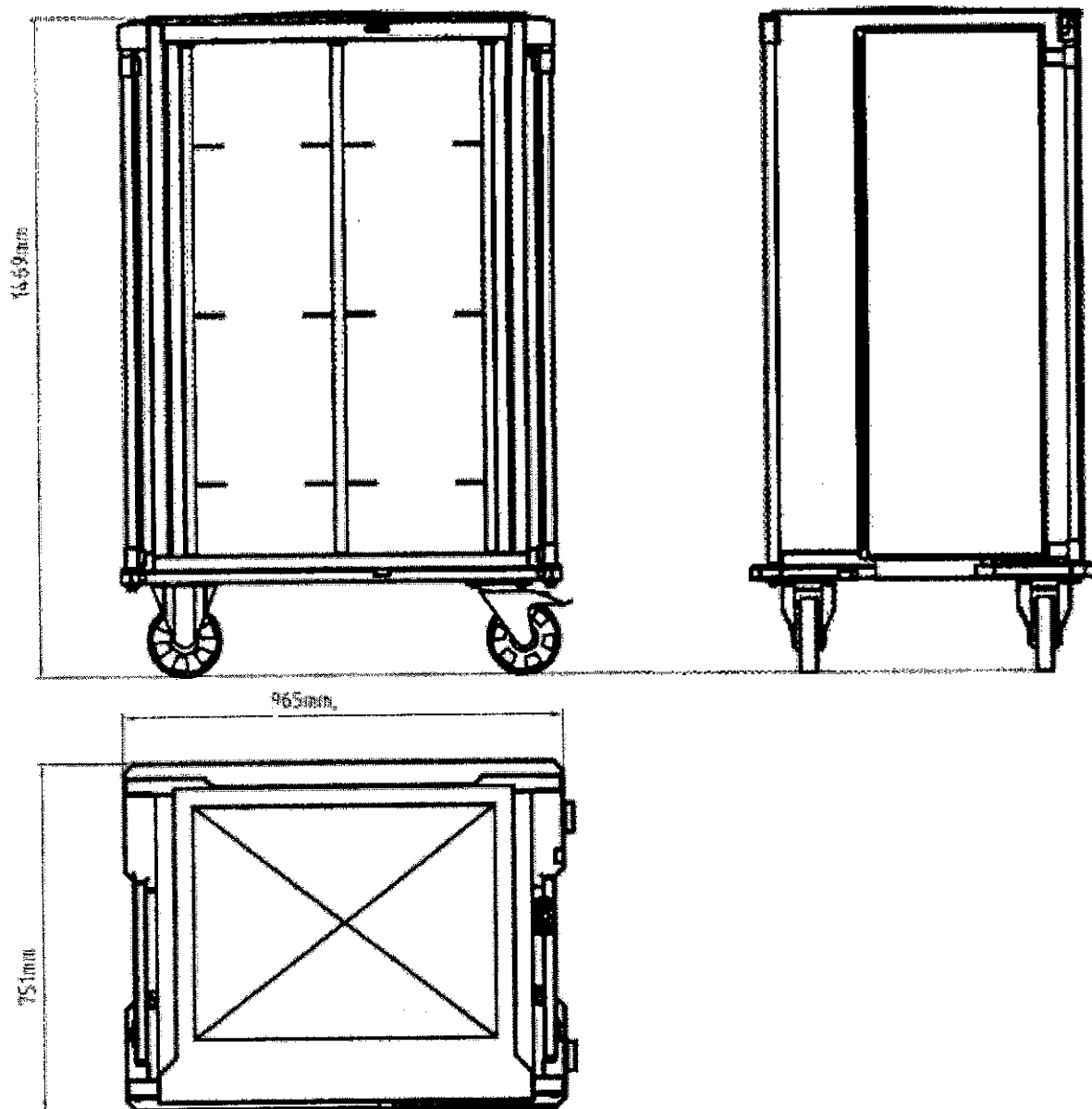


○ Тележка закрытая STW 3

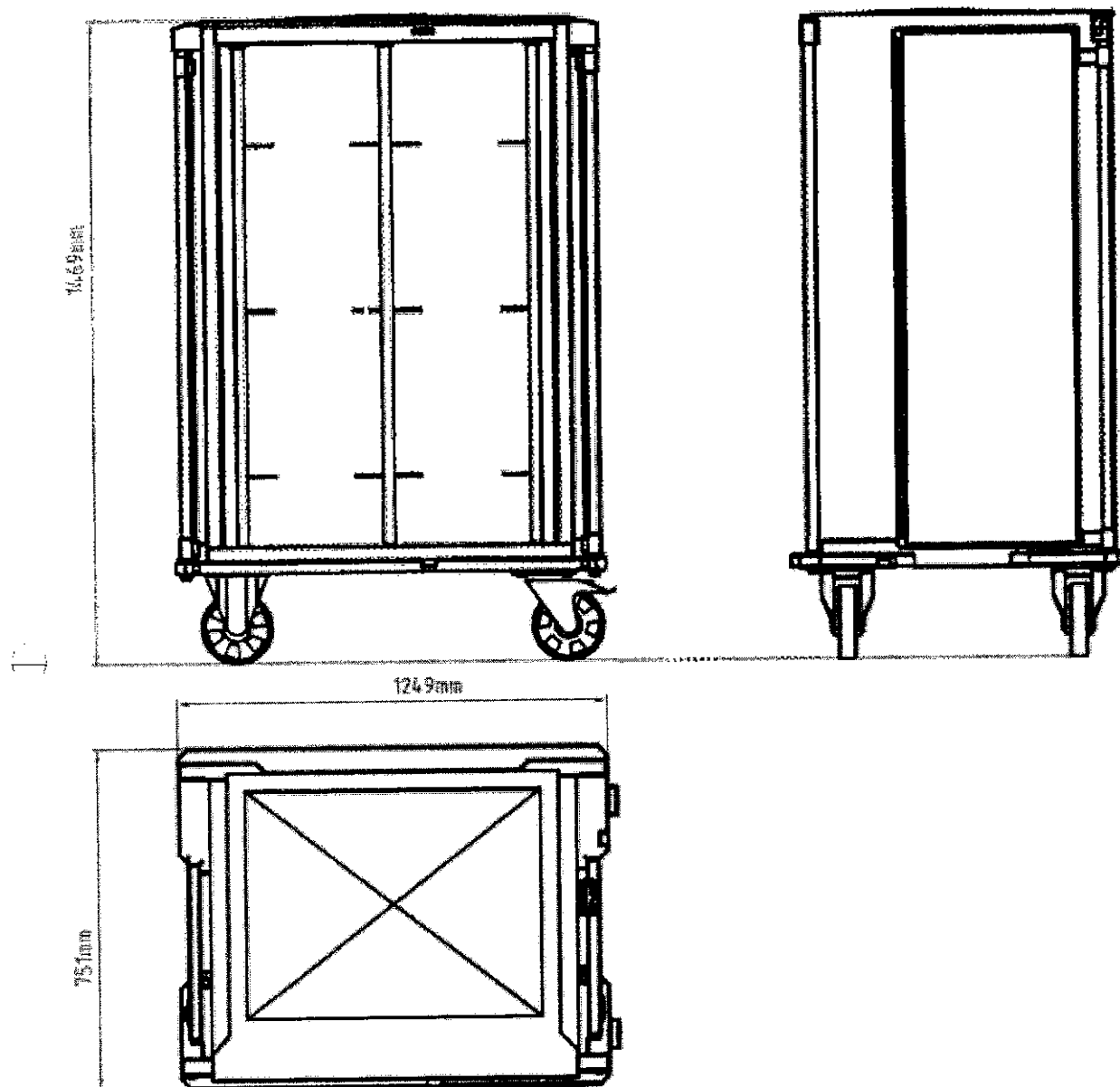


Тележка закрытая STW 4





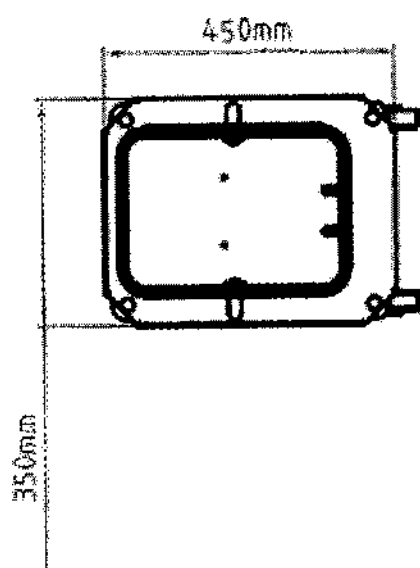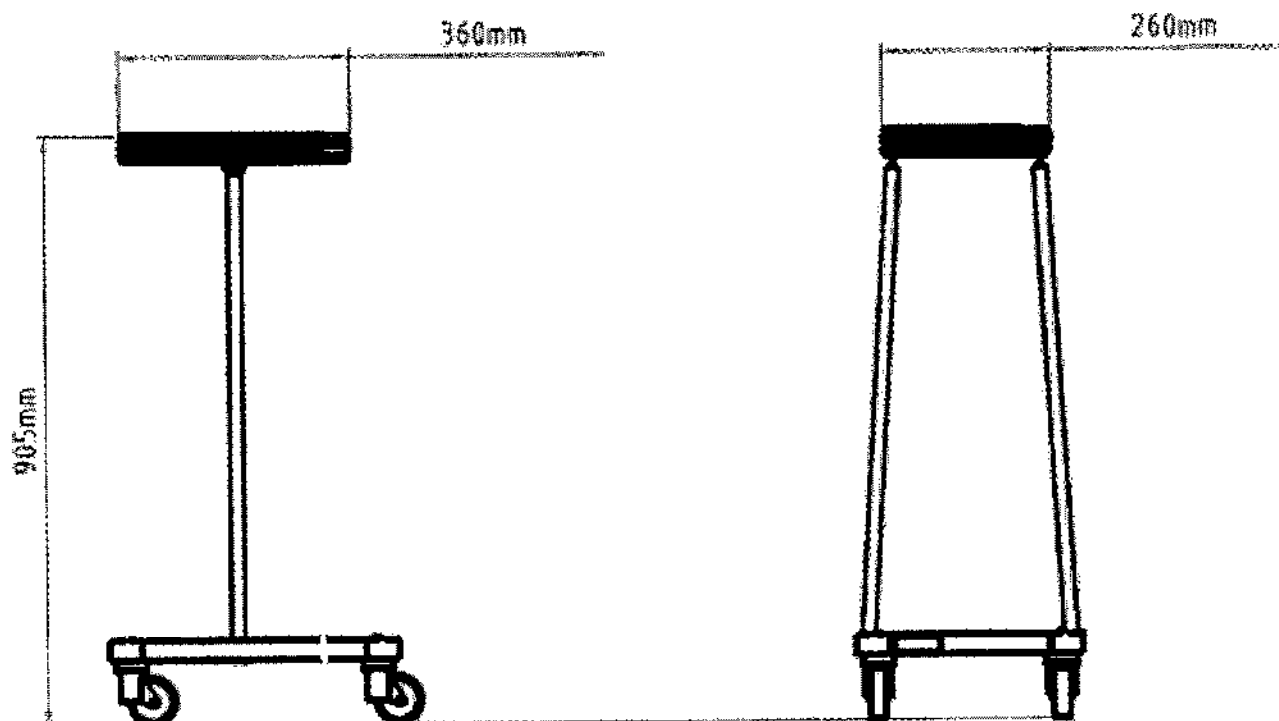




Тележка SWA1

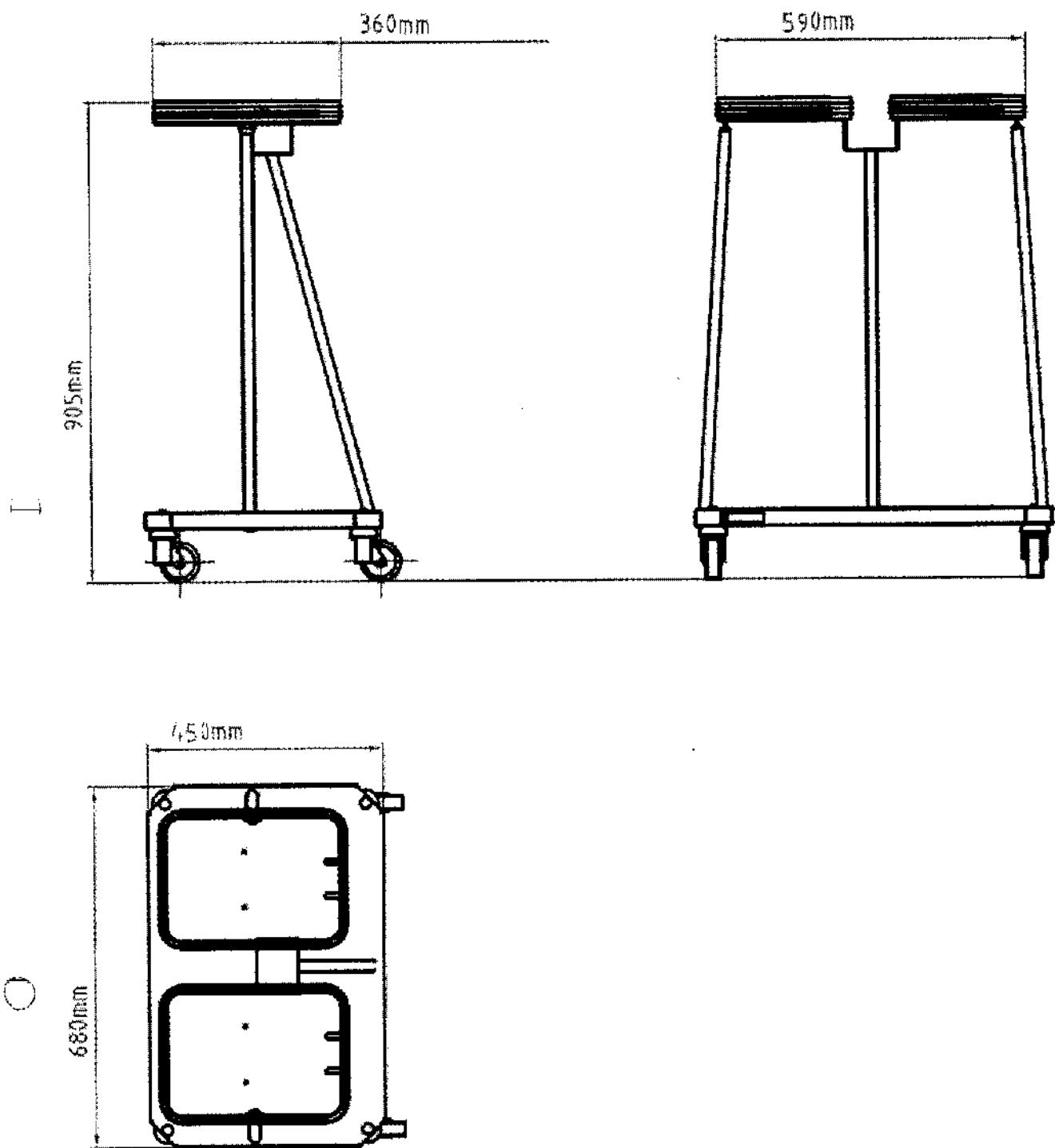

Тележка SWA2

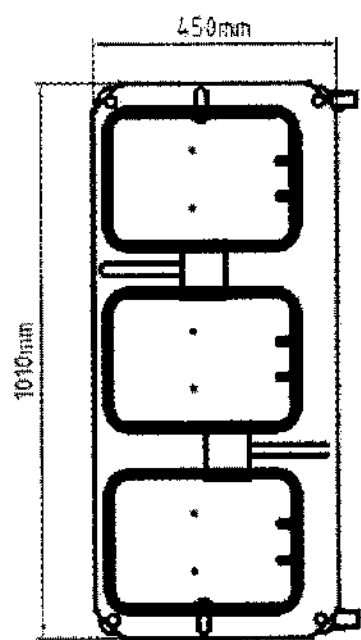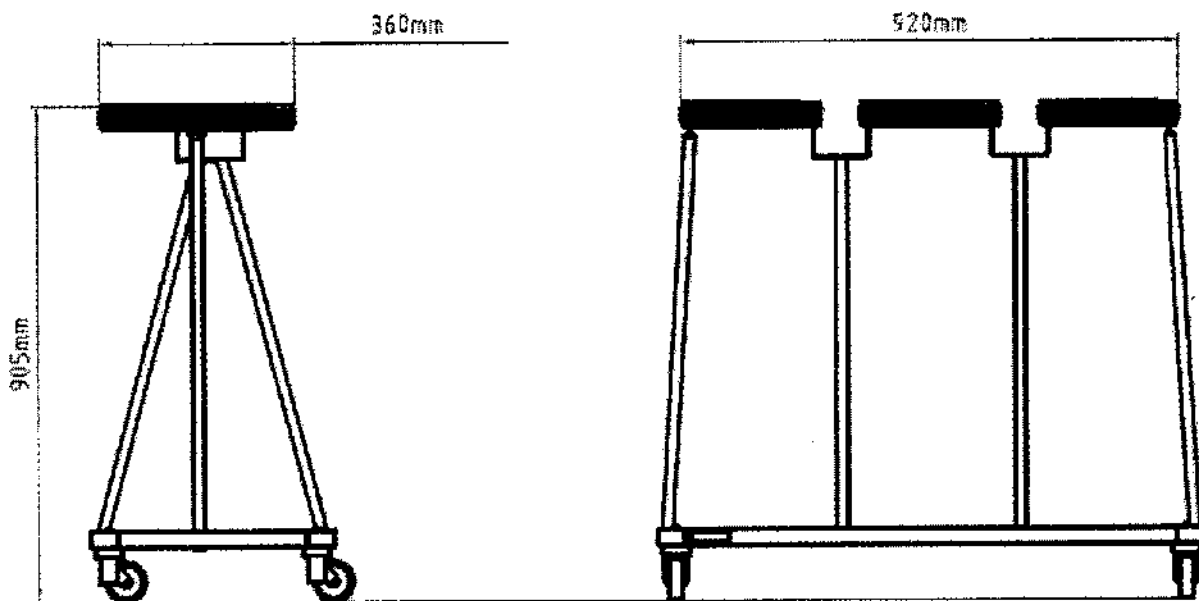


Тележка SWA3

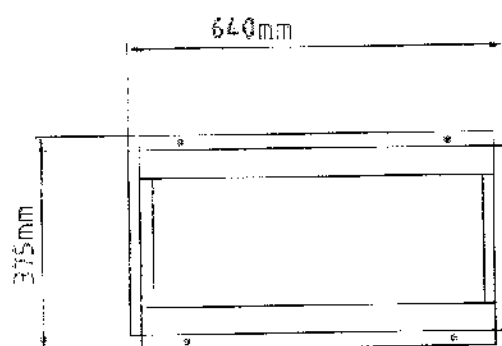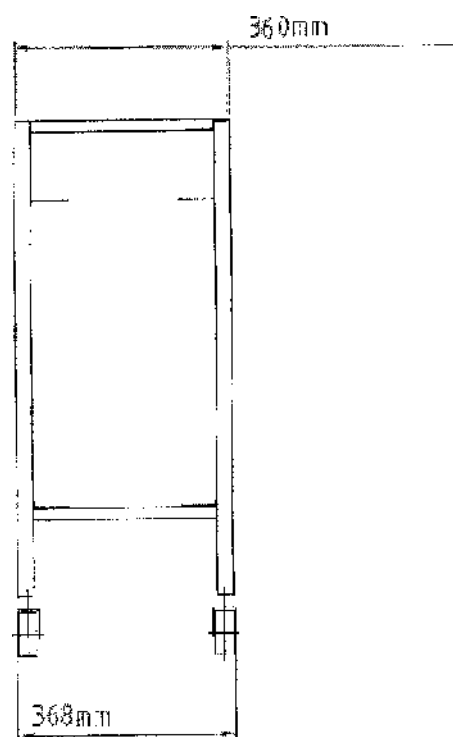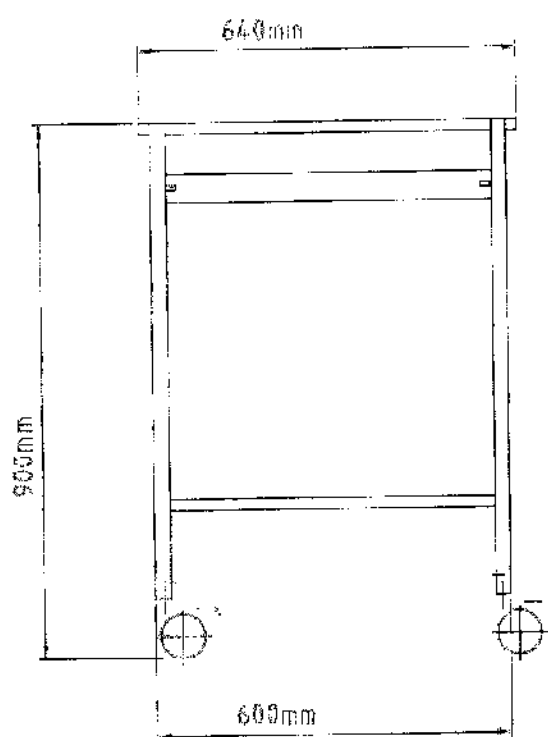


Тележка для отработанного материала ЕС для контейнеров

Чертеж моделей стеллажа:

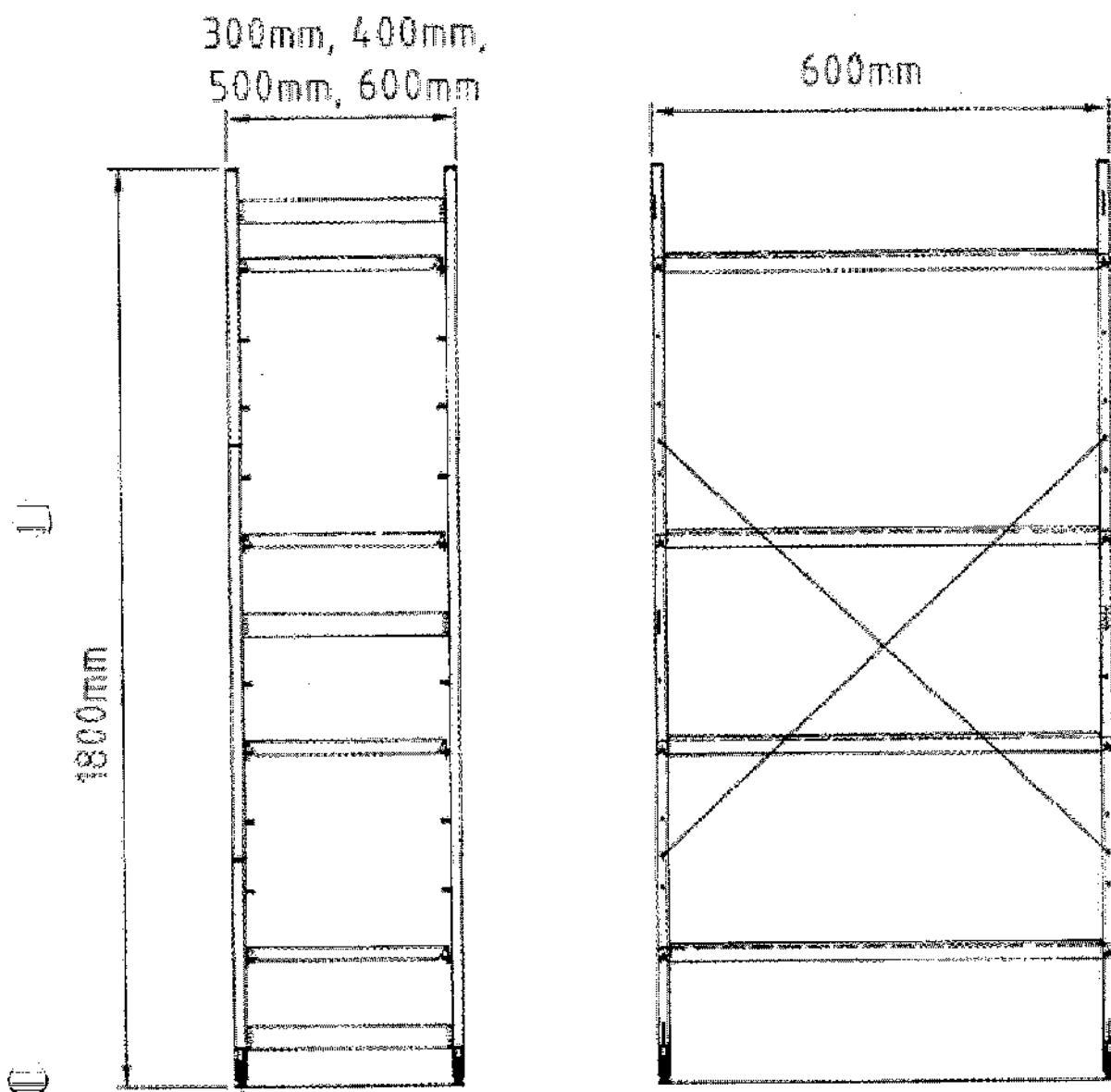


Стеллаж стационарный NORM5 1,2,3,4

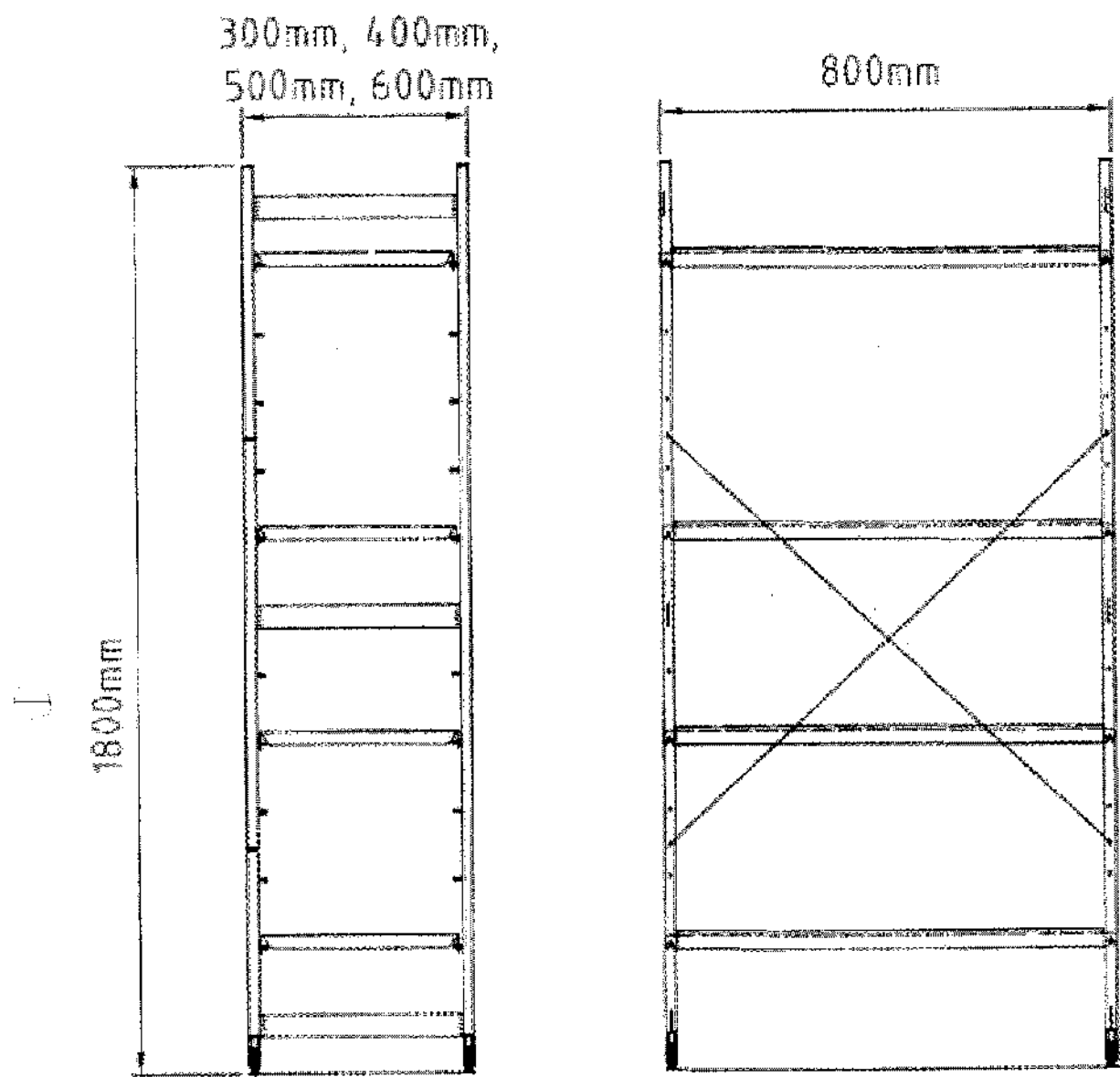


Стеллаж стационарный NORM5 5,6,7,8




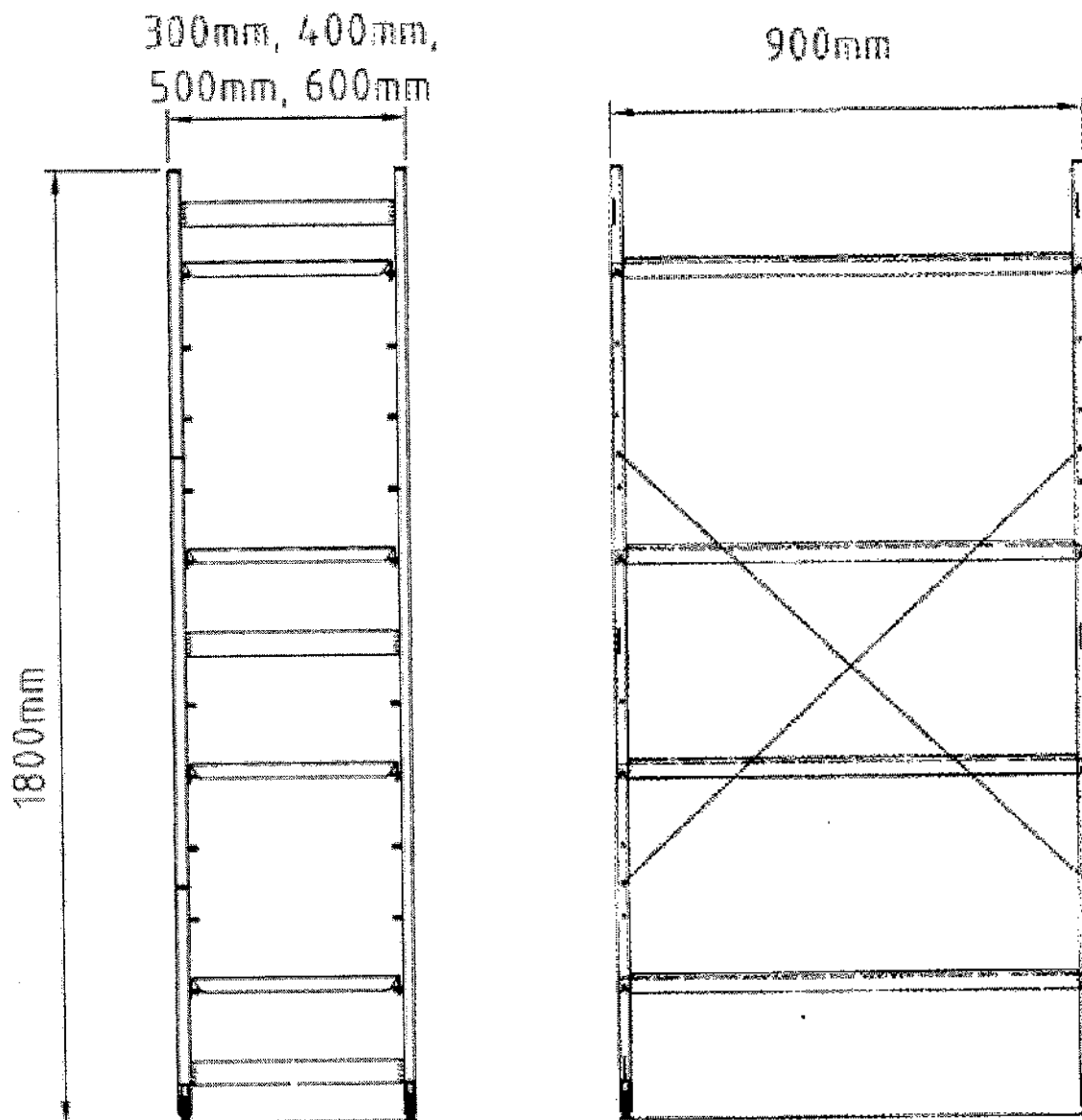


Стеллаж стационарный NORM5 9,10,11,12

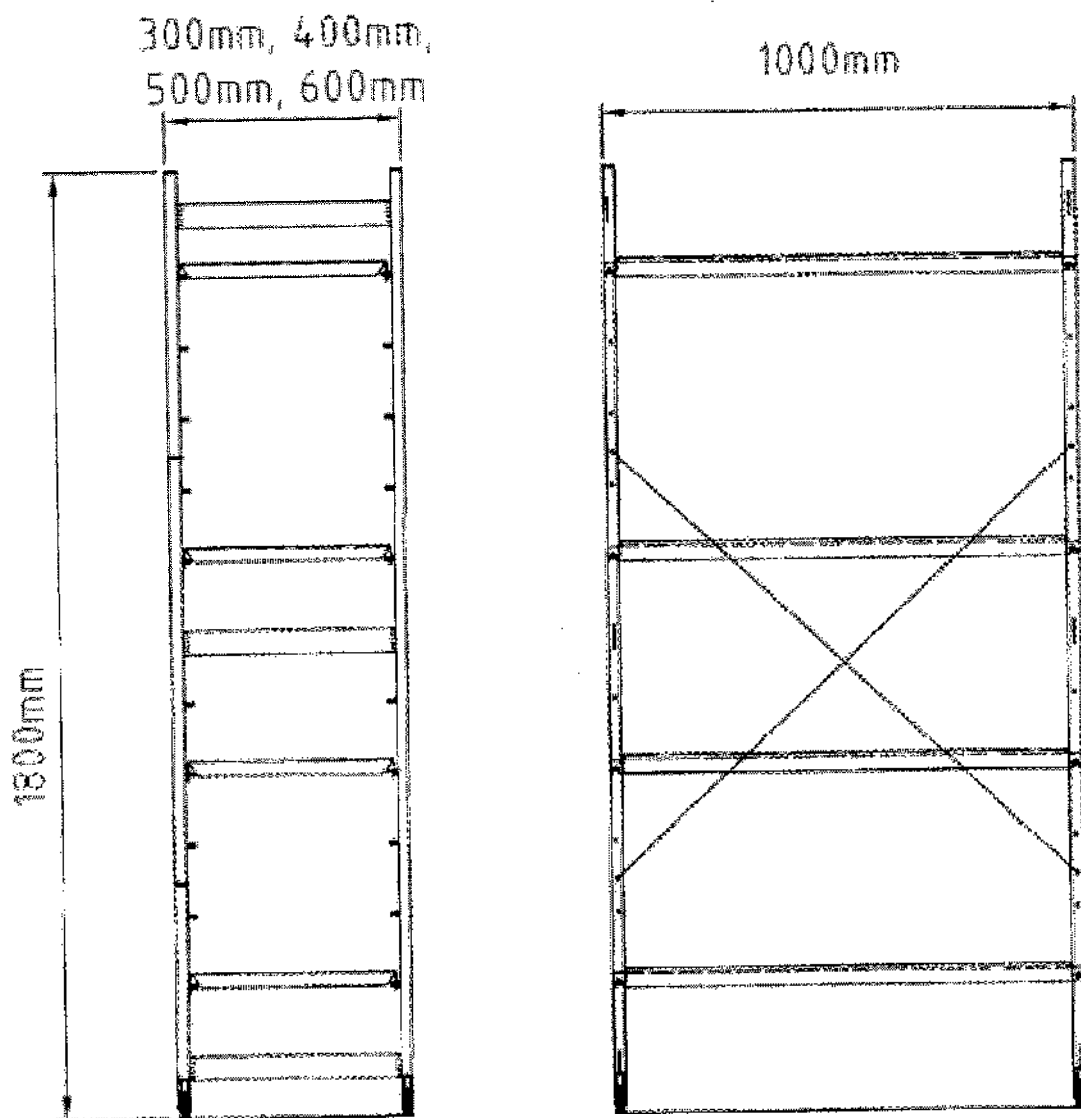


Стеллаж стационарный NORM5 13,14,15,16

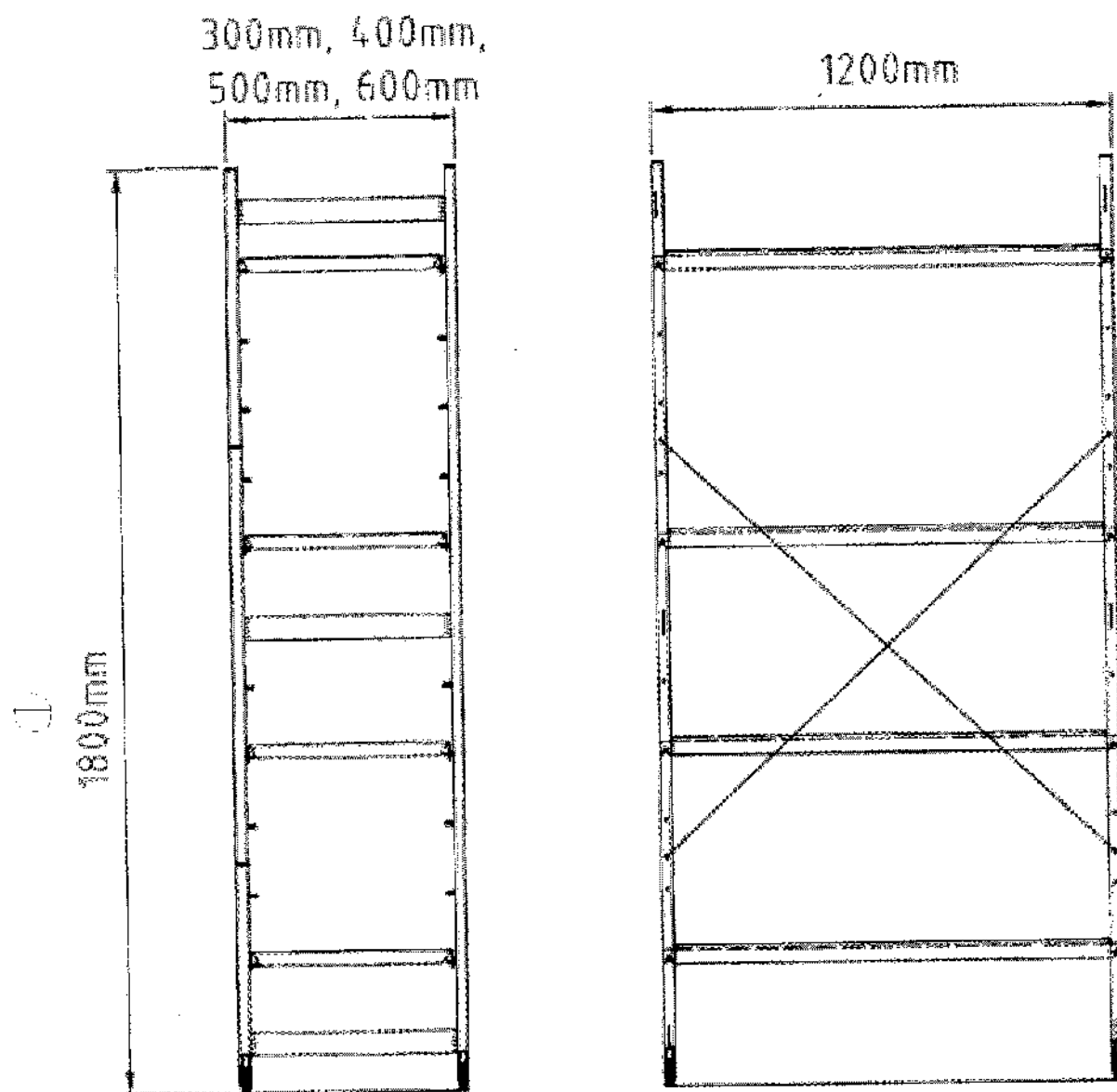

Стеллаж стационарный NORM5 17,18,19,20

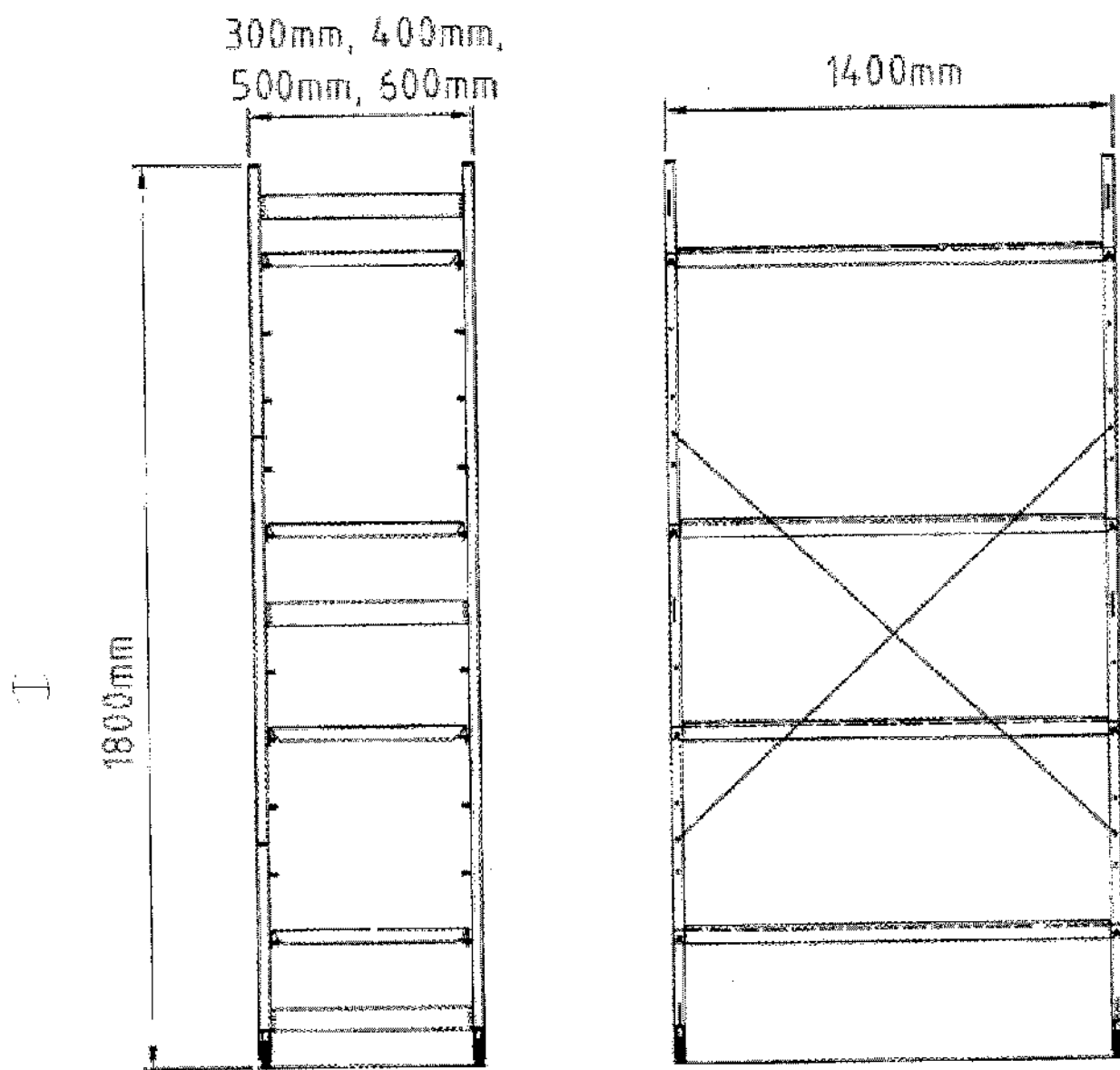


Стеллаж стационарный NORM5 21,22,23,24

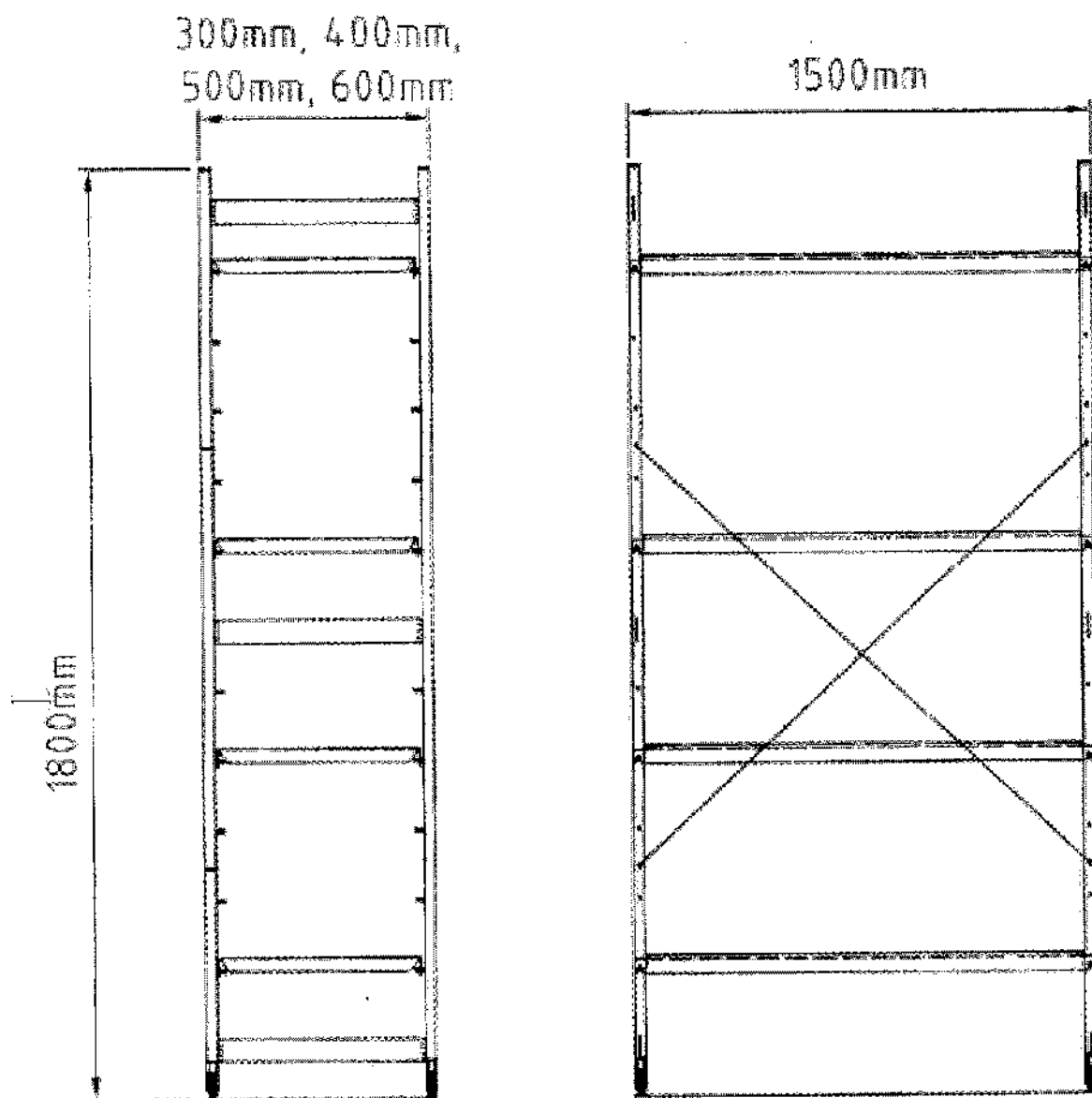


Стеллаж стационарный NORM5 25,26,27,28




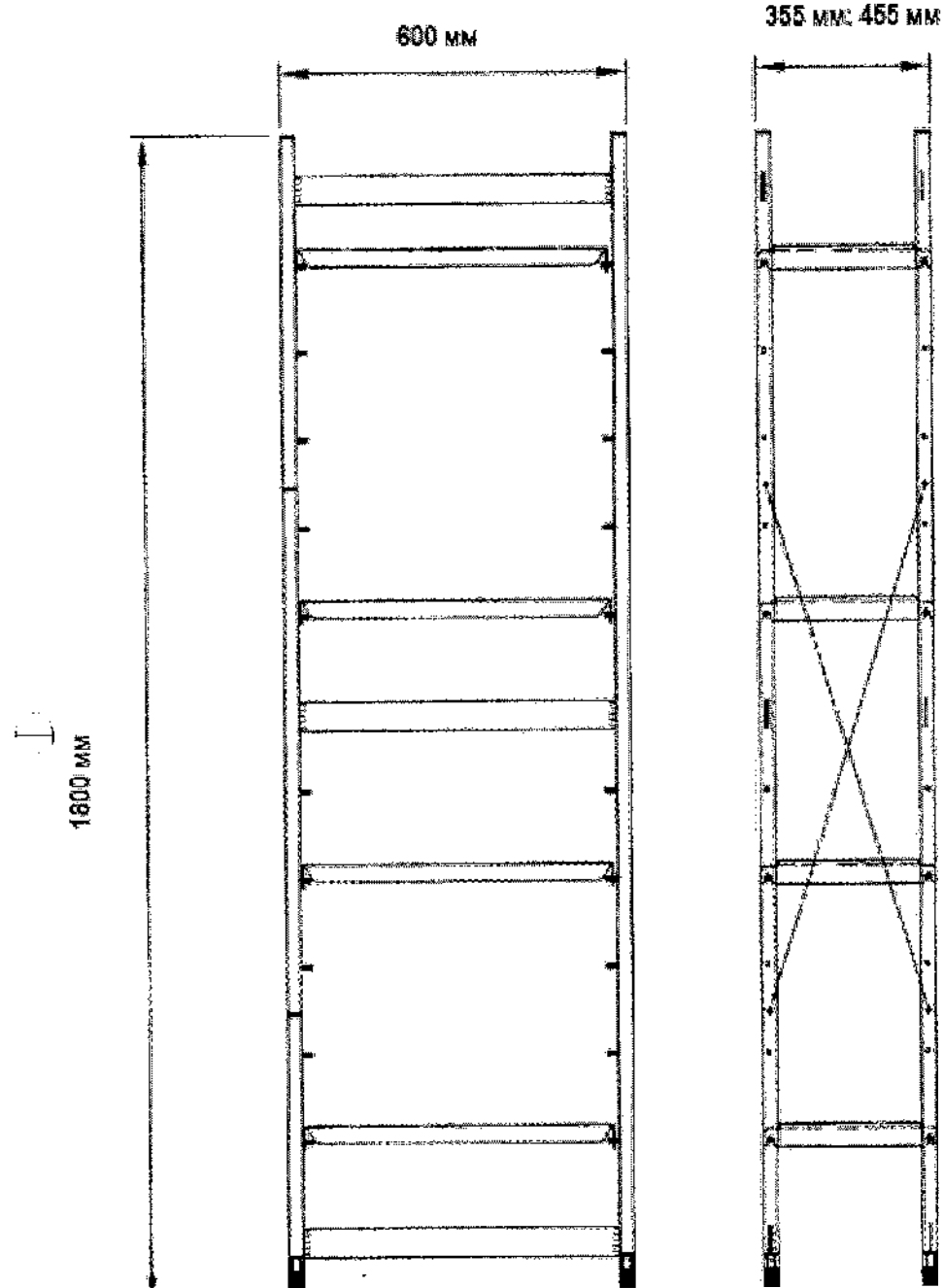


Стеллаж стационарный NORM5 MEDIDUL 1,2

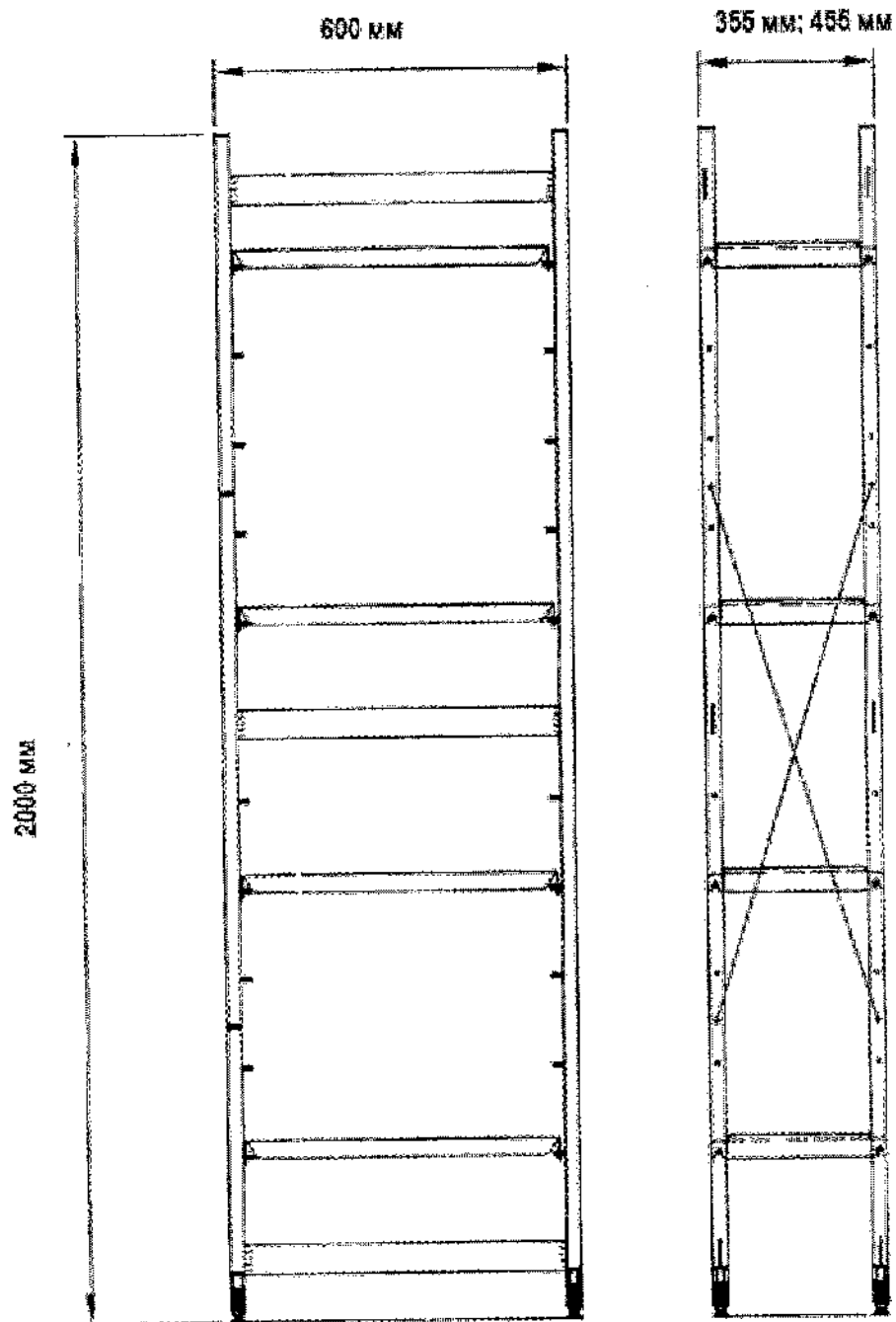


Стеллаж стационарный NORM5 MEDIDUL 3,4

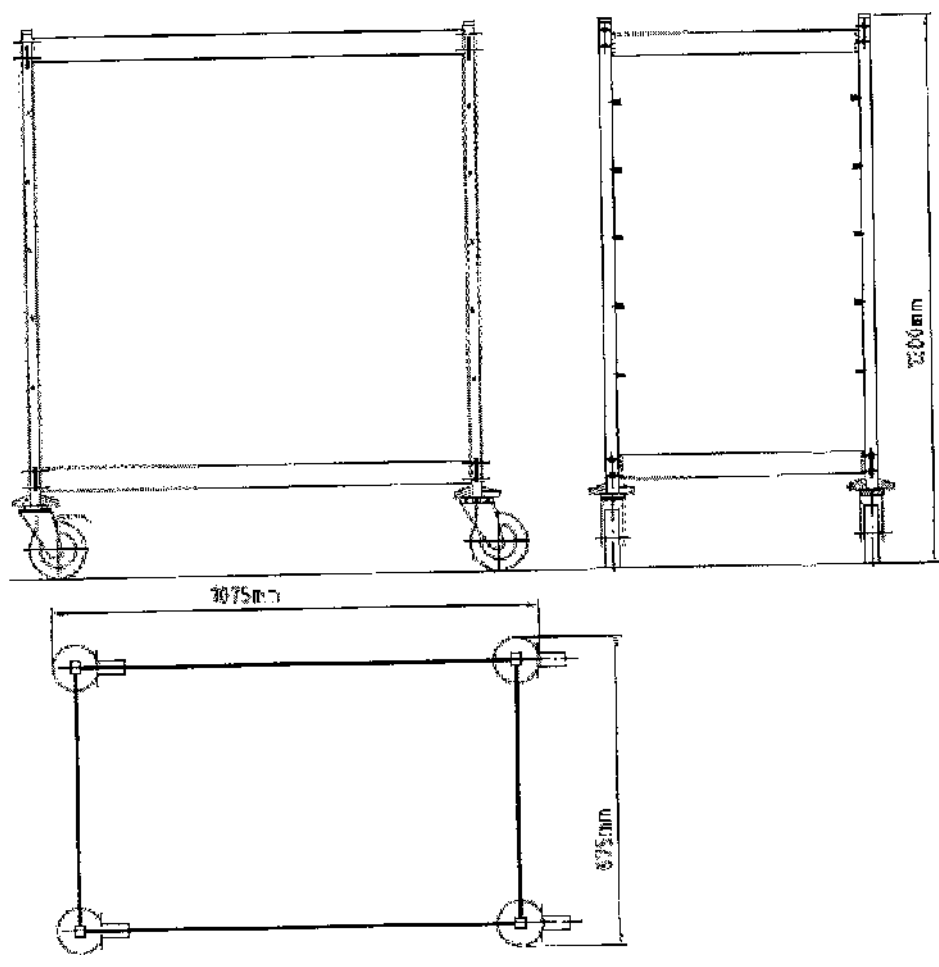


Стеллаж мобильный RTWz 1

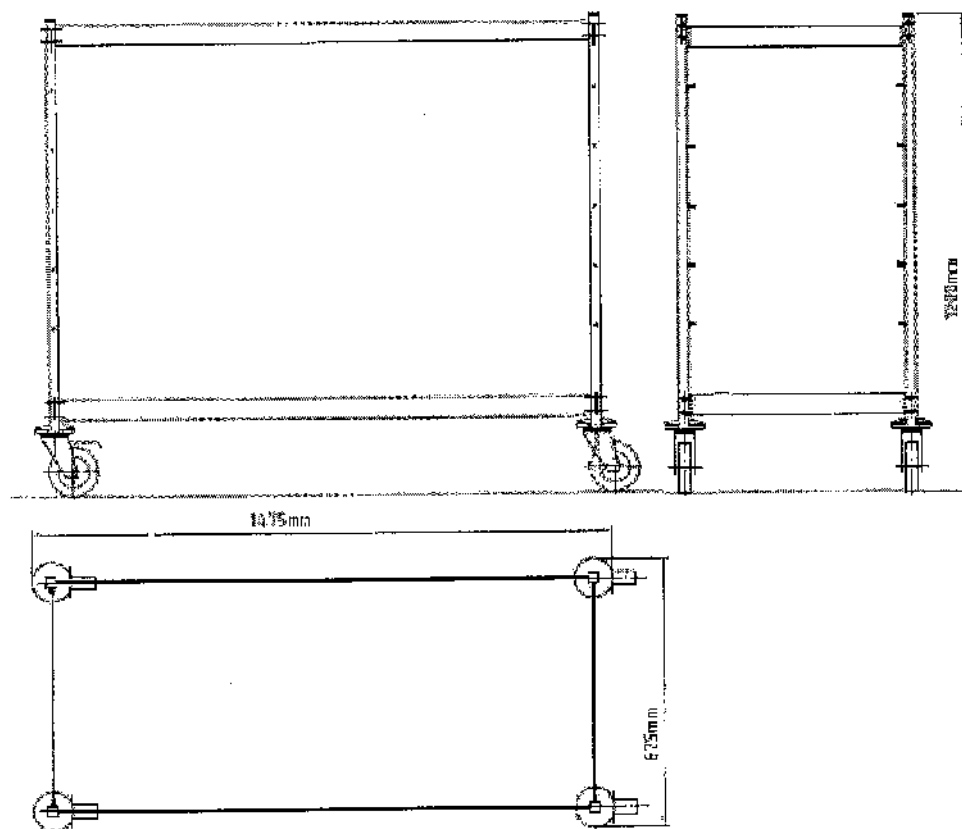


Стеллаж мобильный RTWz 2

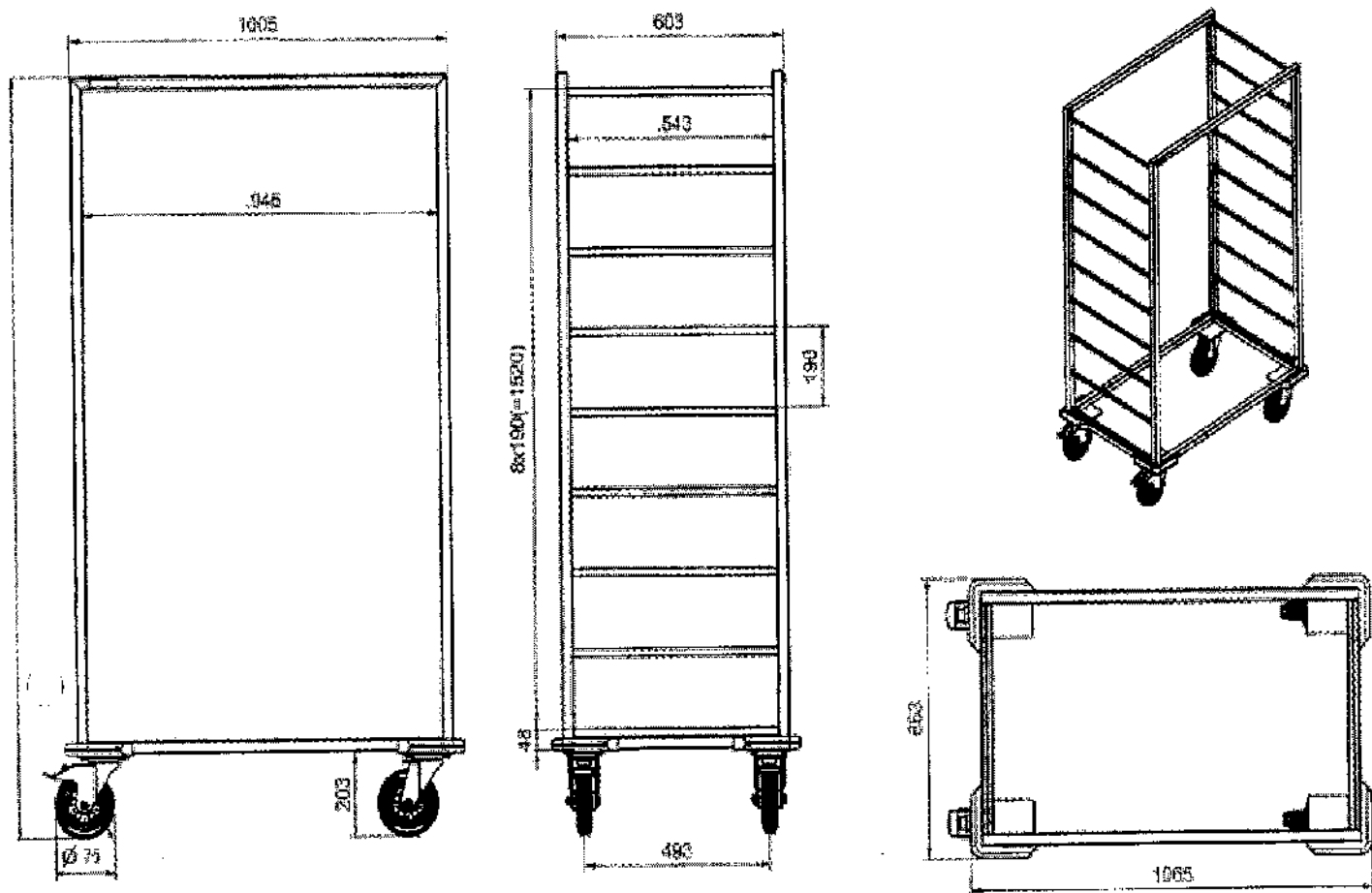

Стеллаж мобильный RTWs 2



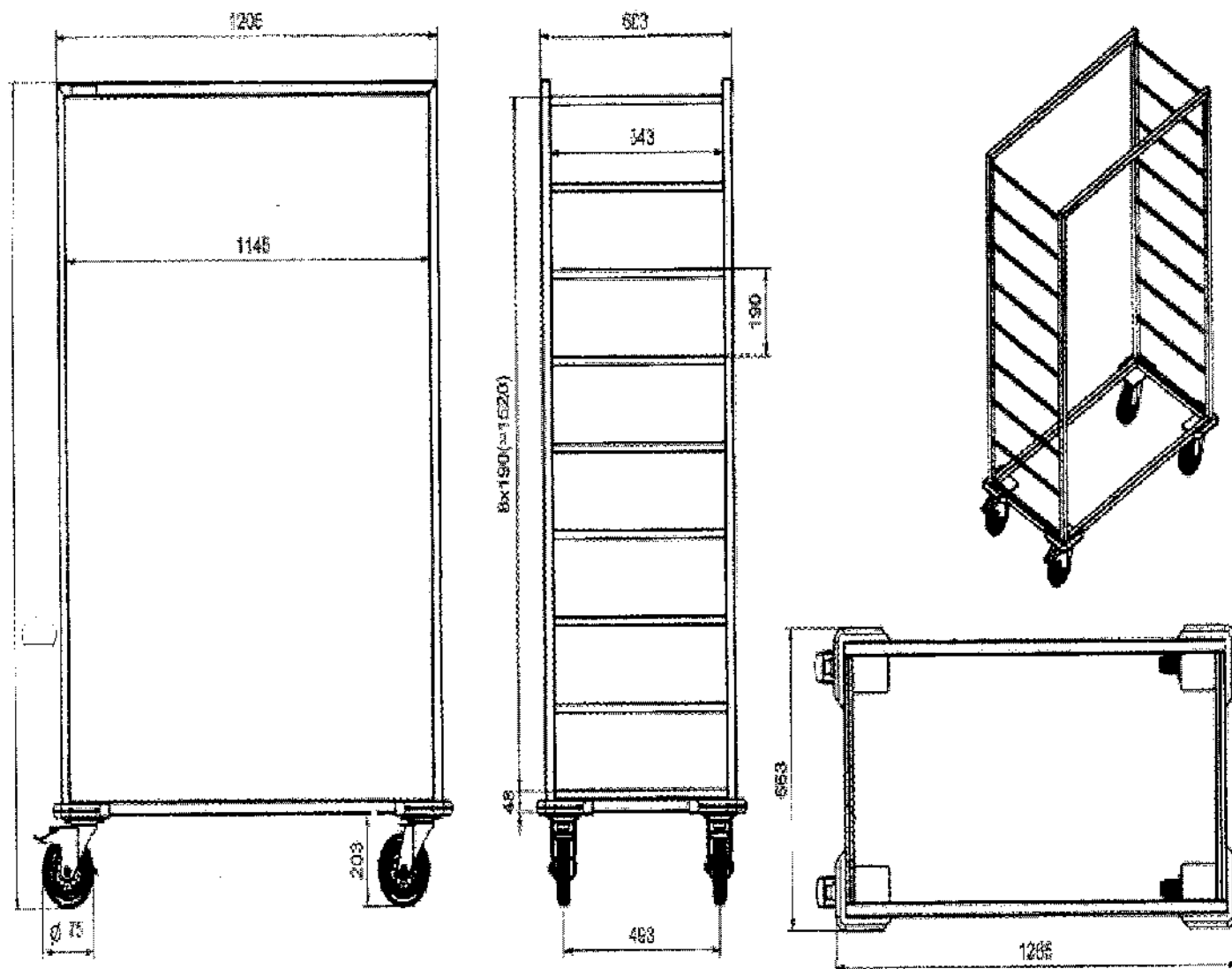


Стеллаж мобильный RTWs 1

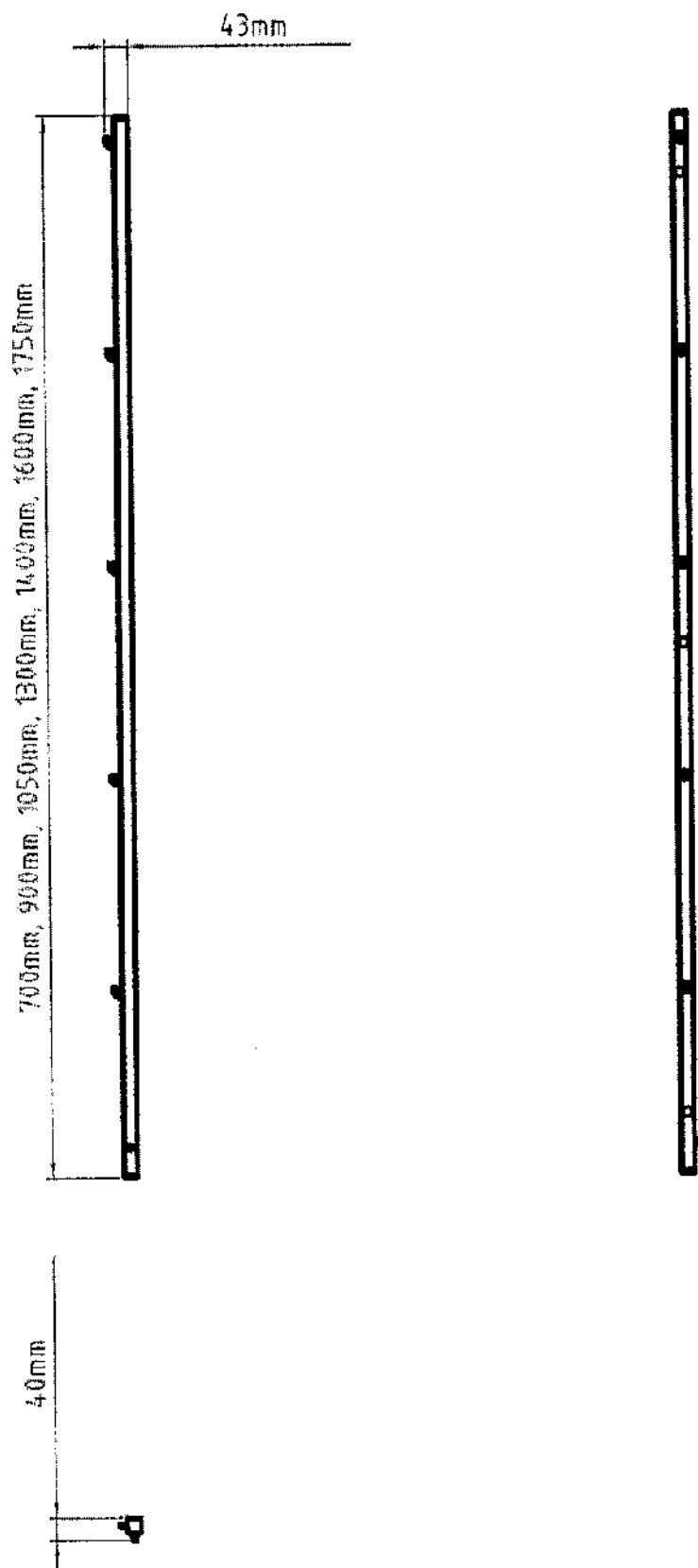


Настенный стеллаж (настенная шина) 1,2,3,4,5,6,7


Чертежи принадлежностей:

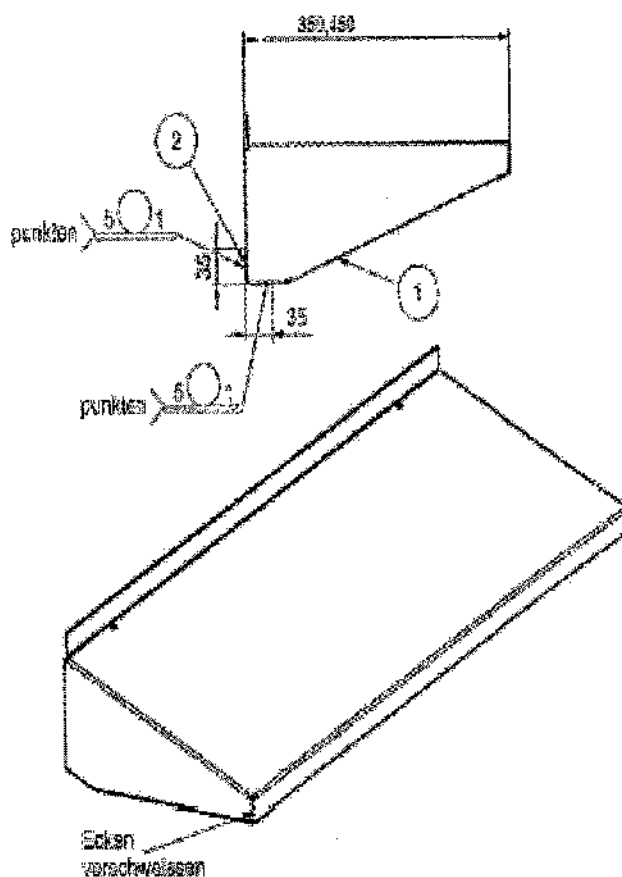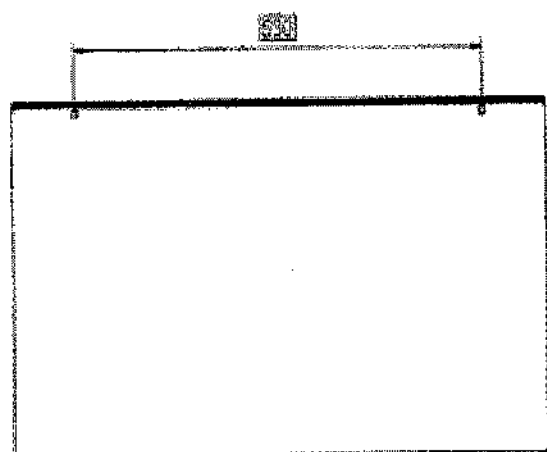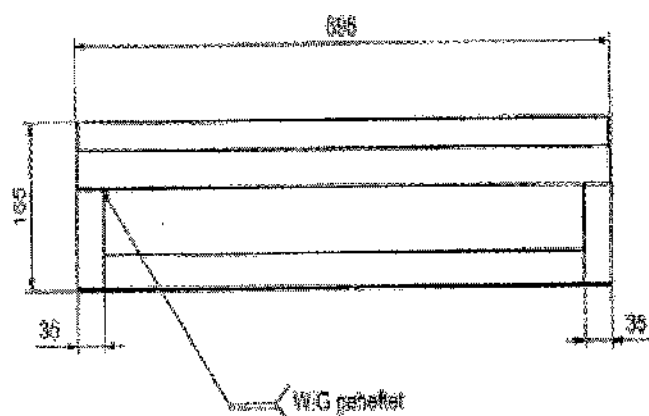


Полка для настенного стеллажа 1,2

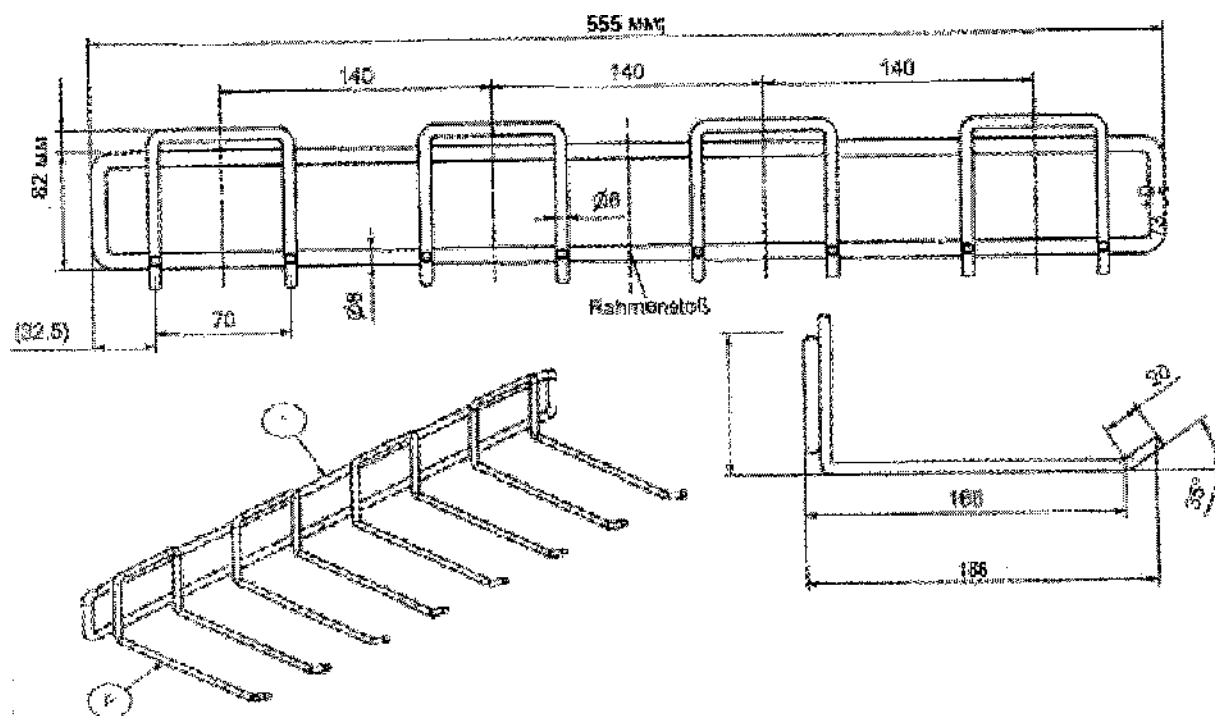


Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами 8 крюков

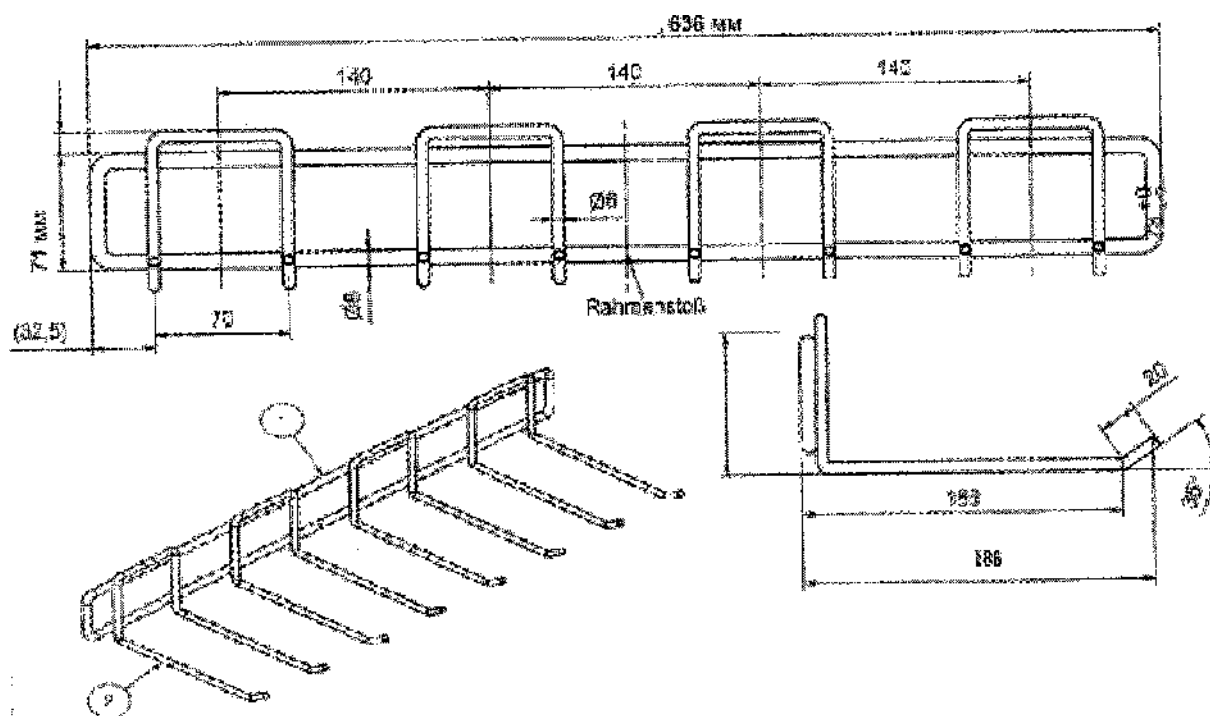


Подвесная планка для хранения и транспортировки зондов, проб, шлангов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами 6 крюков

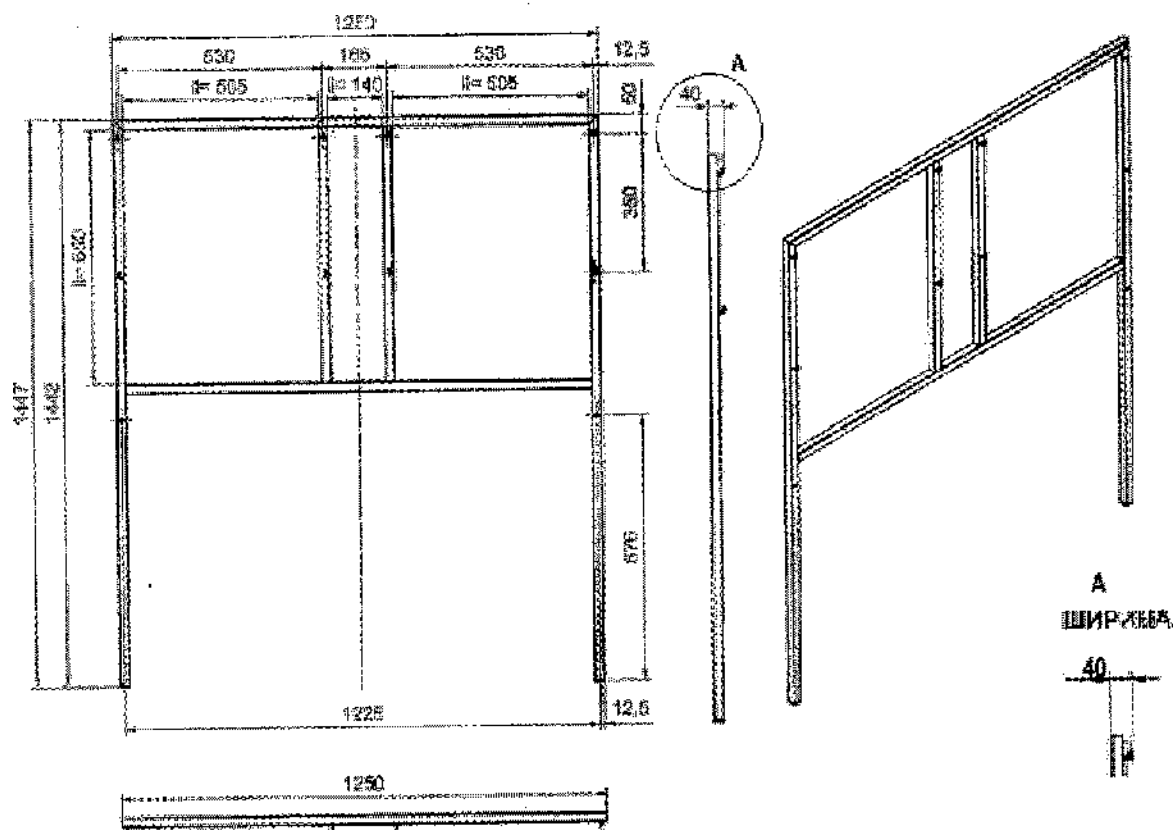


Рама с крючками для стогов моделей АТ-О, АТ-З, РТ 1

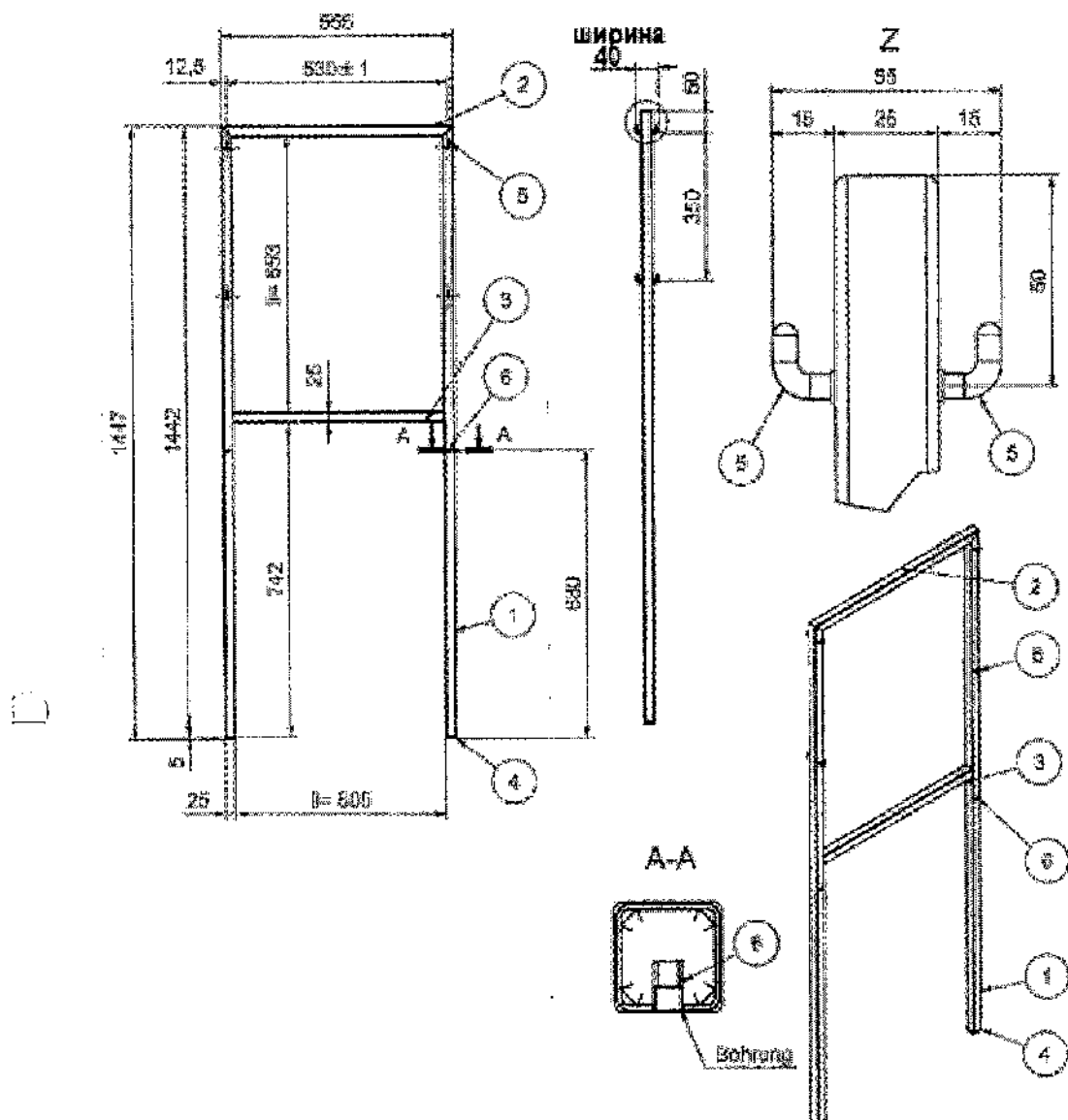


Рама с крючками для столов моделей АТ-О, АТ-З, РТ2

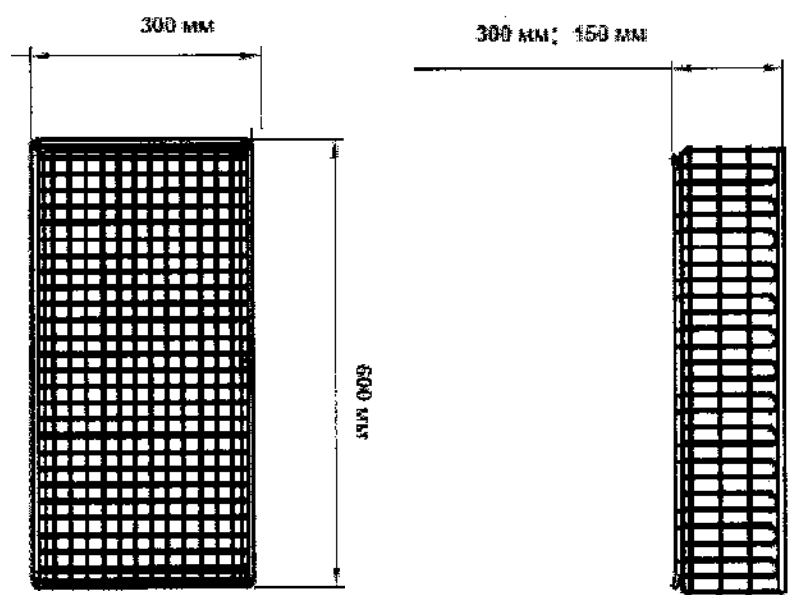



Корзина проволочная формат СтУ (StE) 1,2

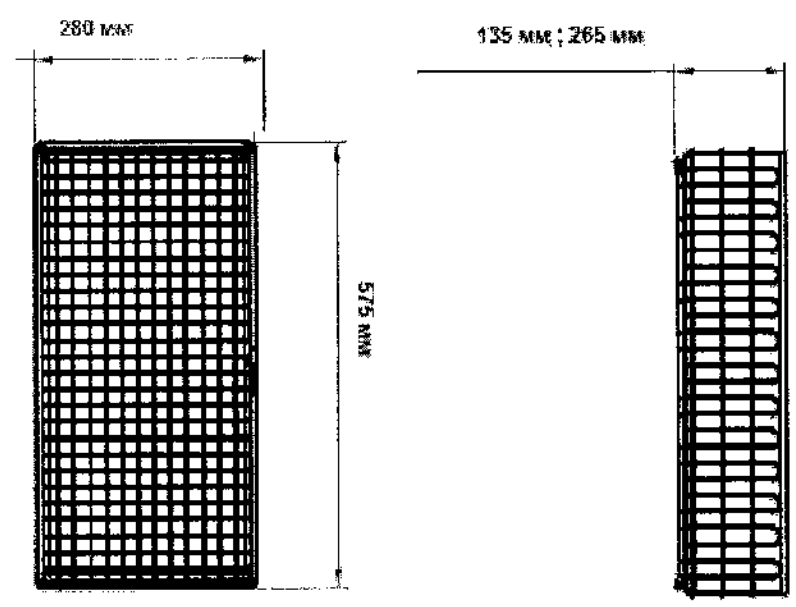


Корзина проволочная формат СтУ (StE) 3,4

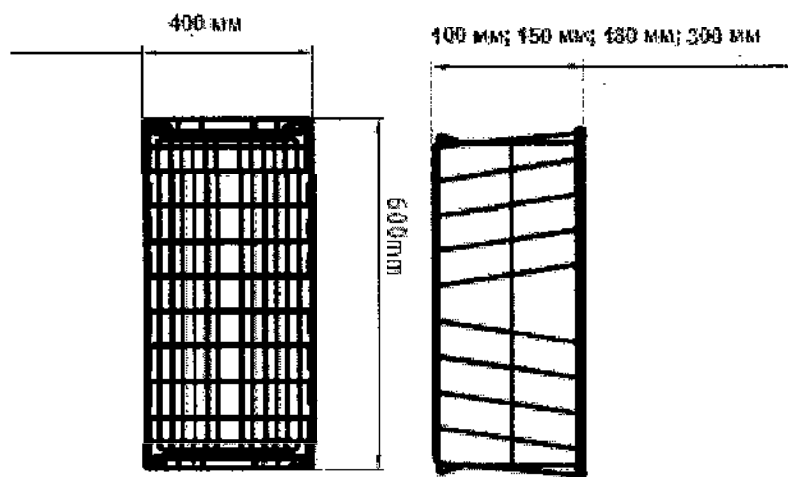


Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 1,2,3,4

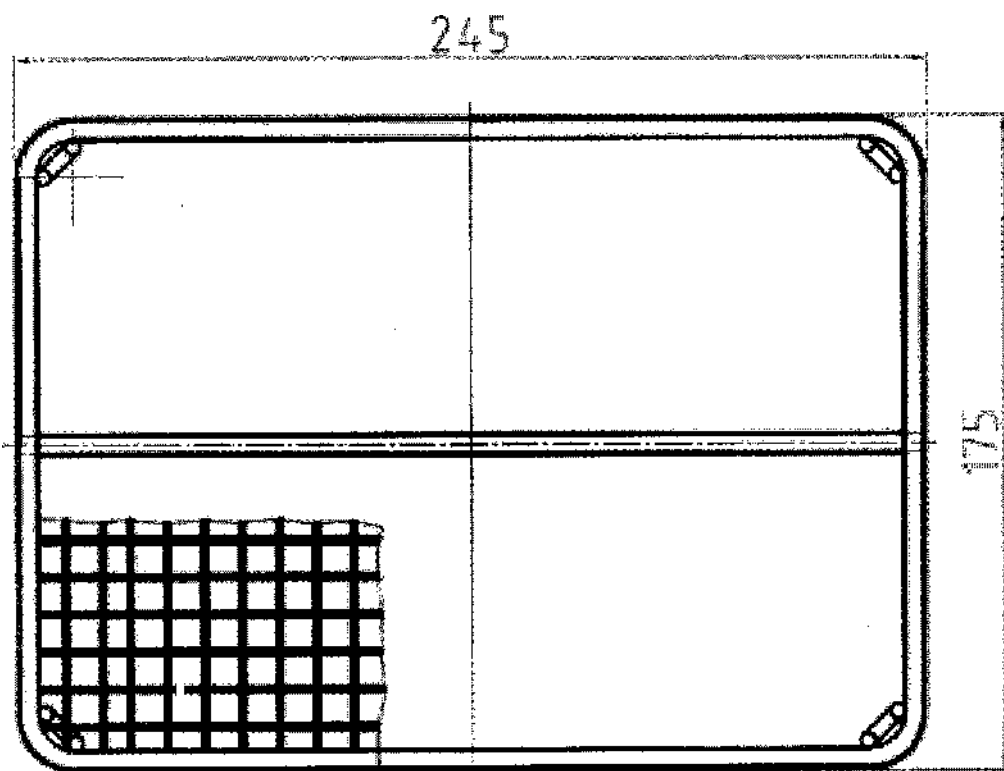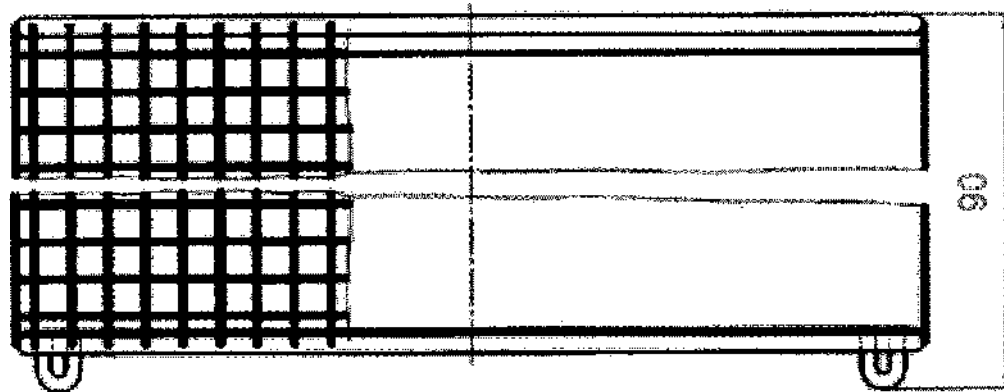


Корзина проволочная для инструментов

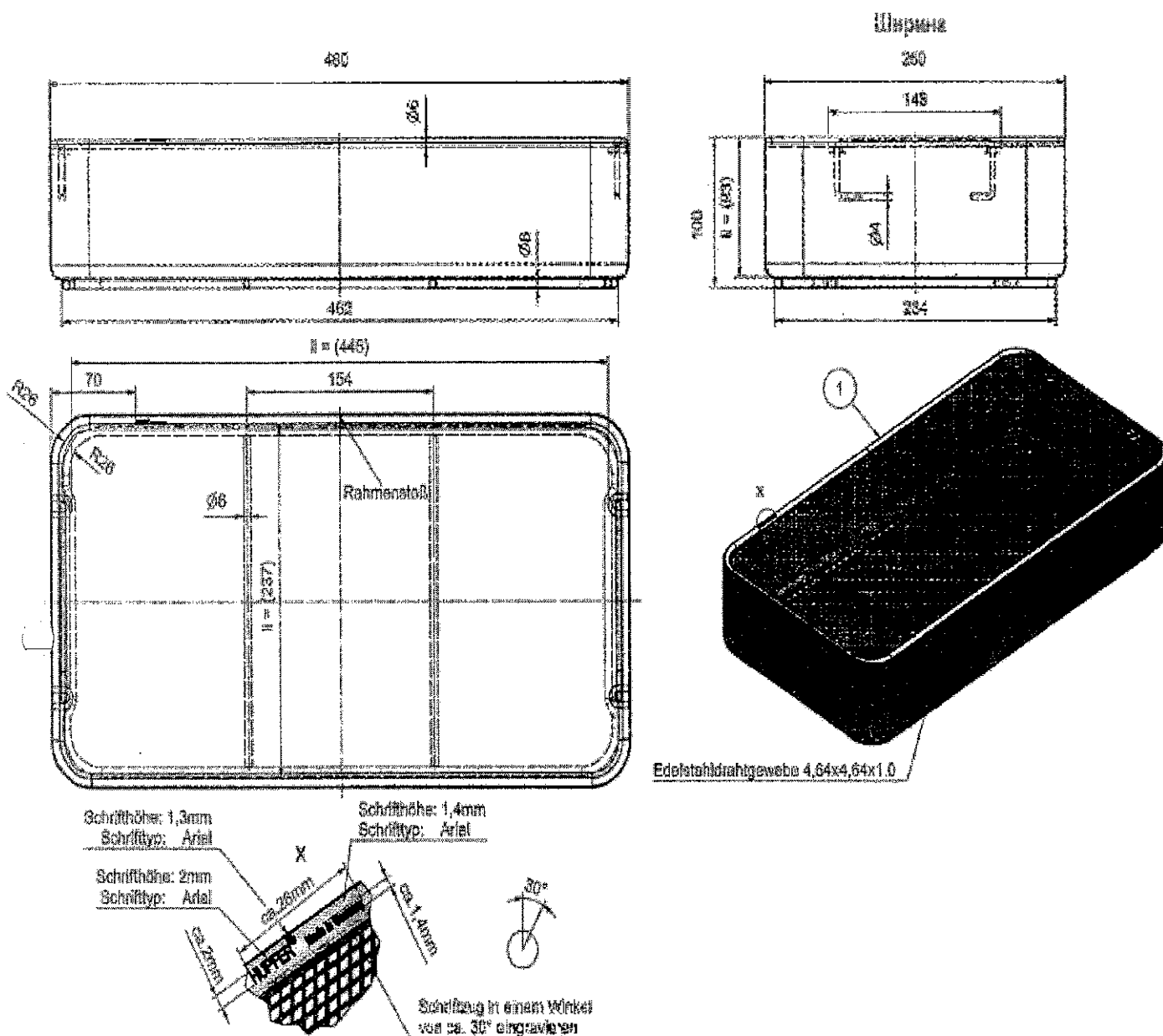


Корзина сетчатая для всех моделей стеллажей, тележек, столов

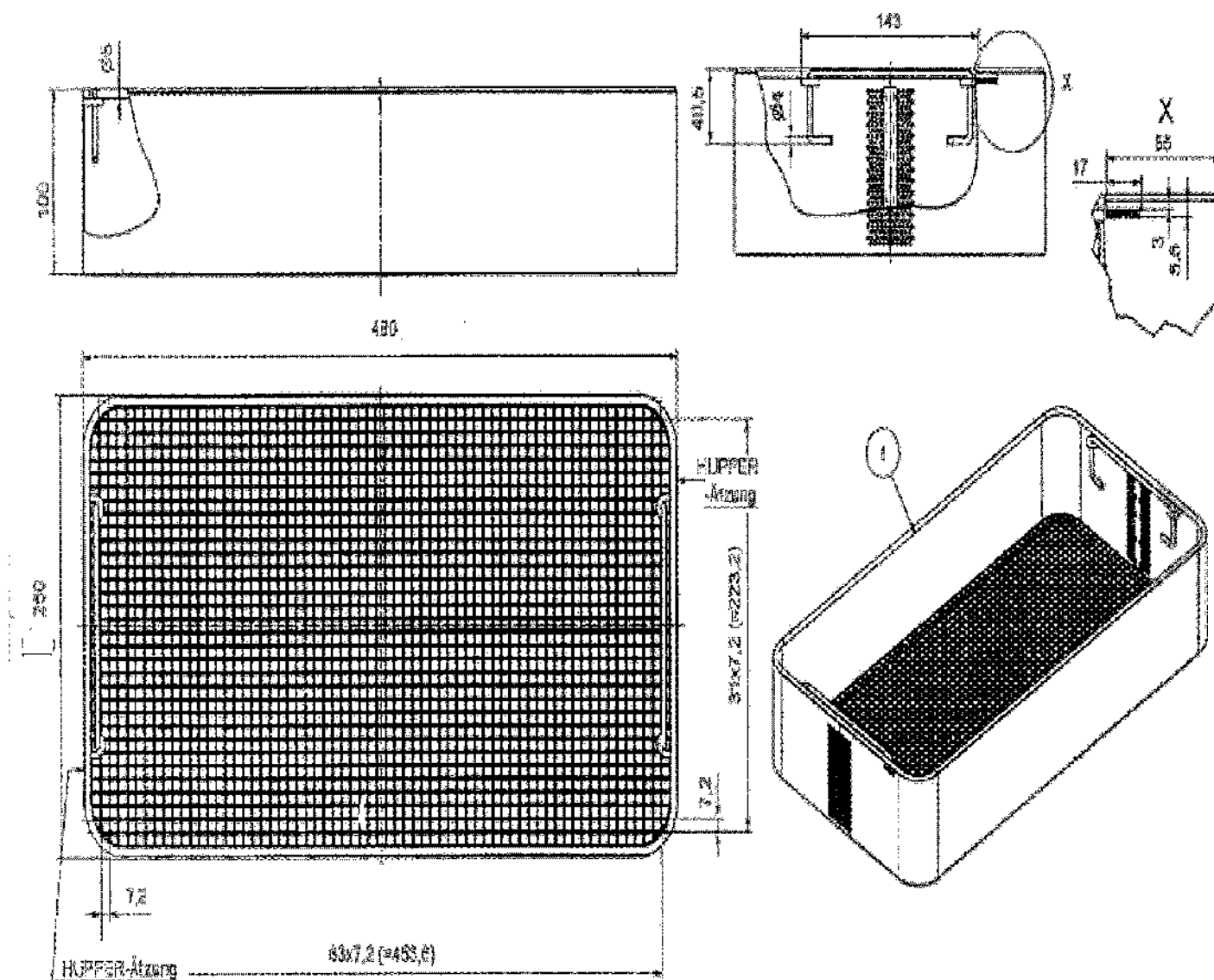


Корзина сетчатая с перфорированными стенками для всех моделей стеллажей, тележек, столов

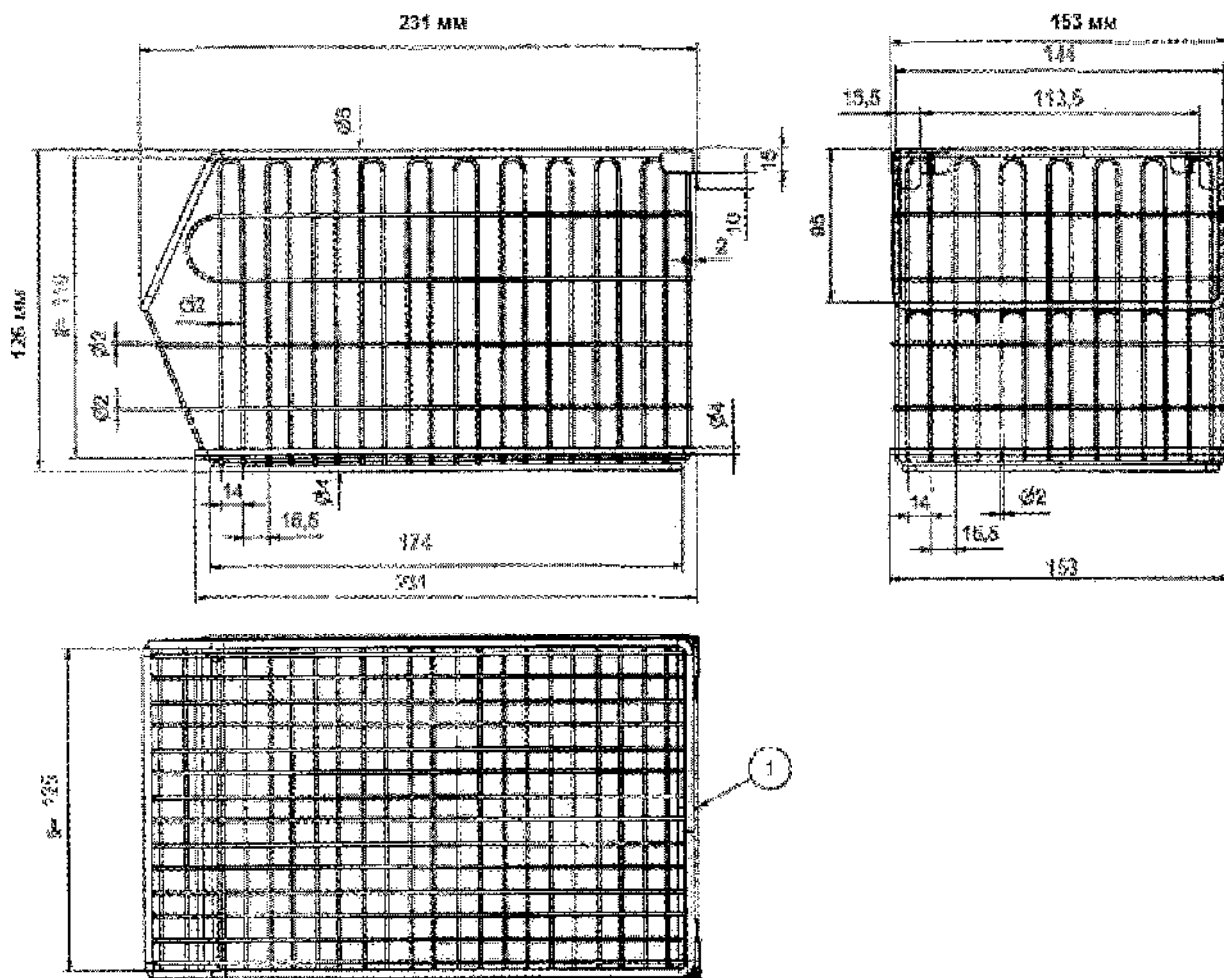


Проволочный контейнер со скосом 2 для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележек, столов

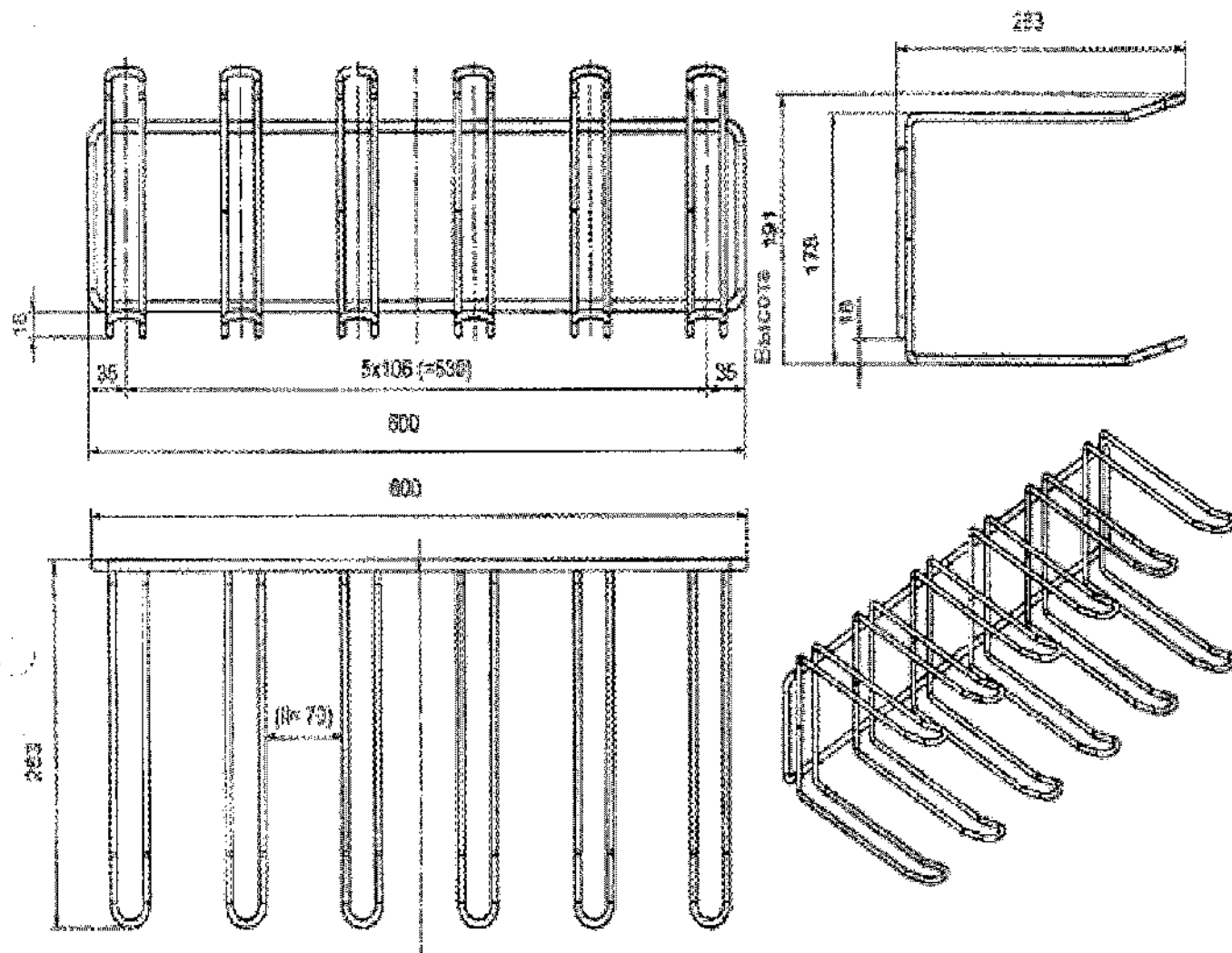


ержатель для обуви для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами

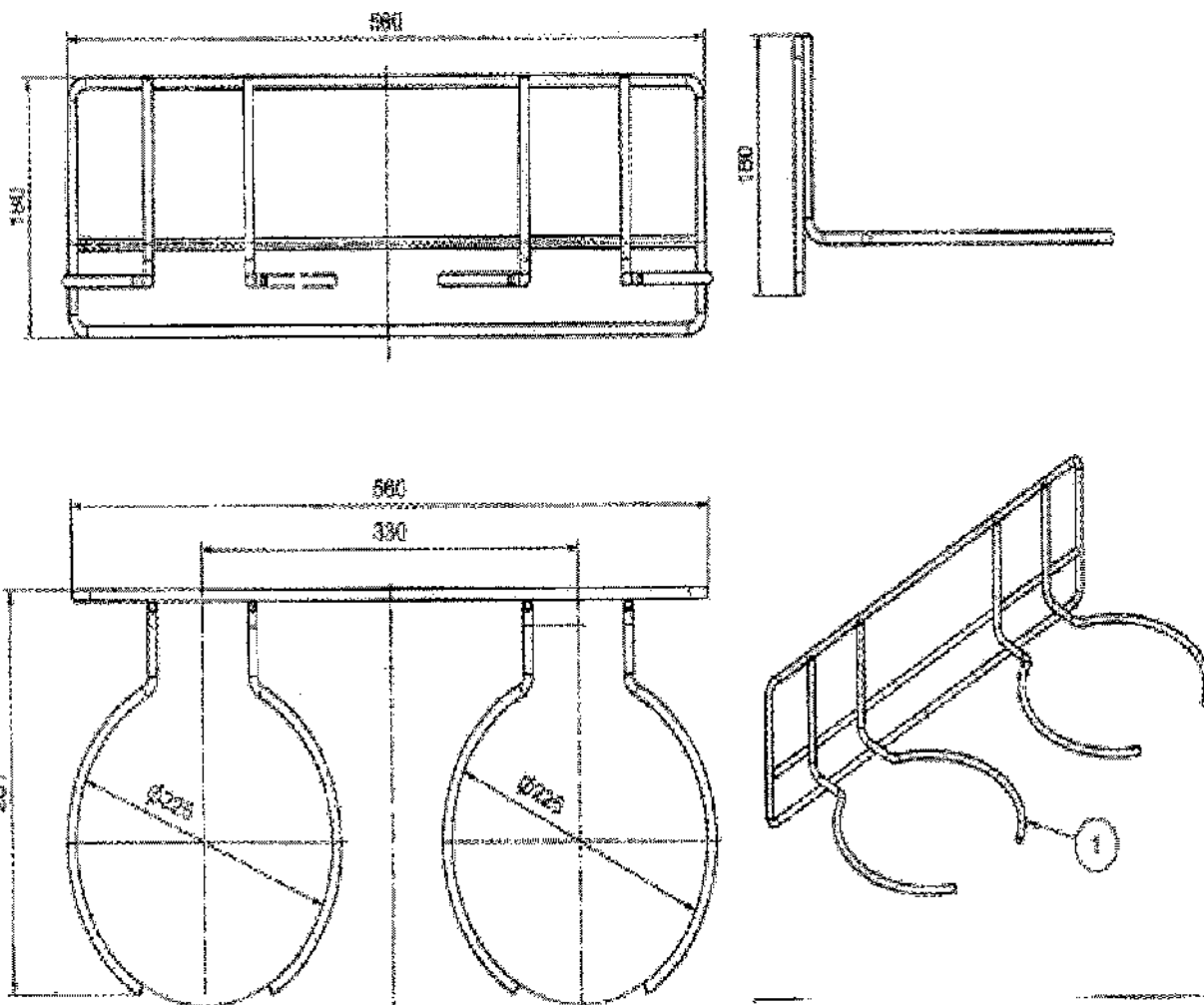




Держатель для емкостей для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами

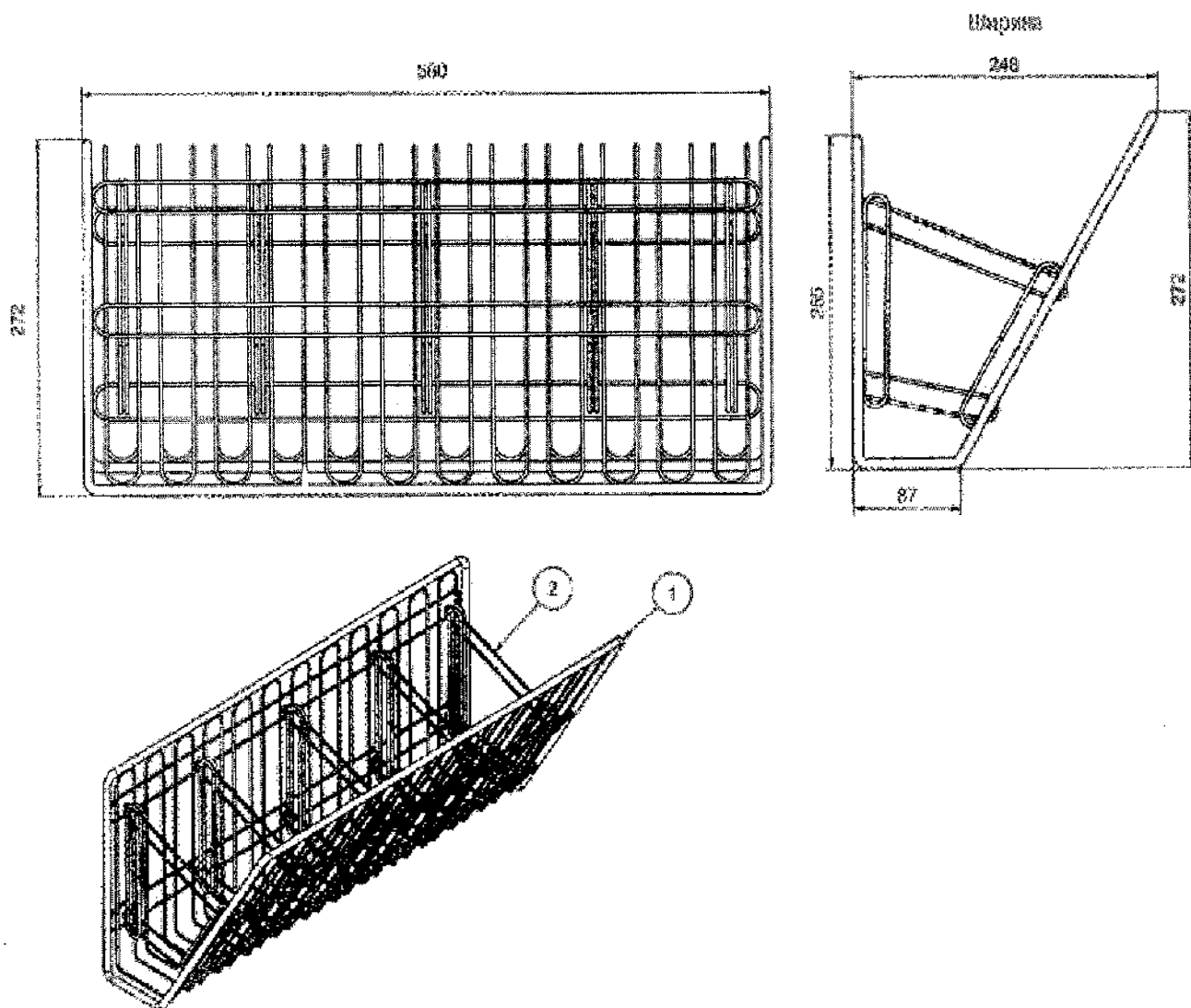


Держатель для мочеприемников для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами

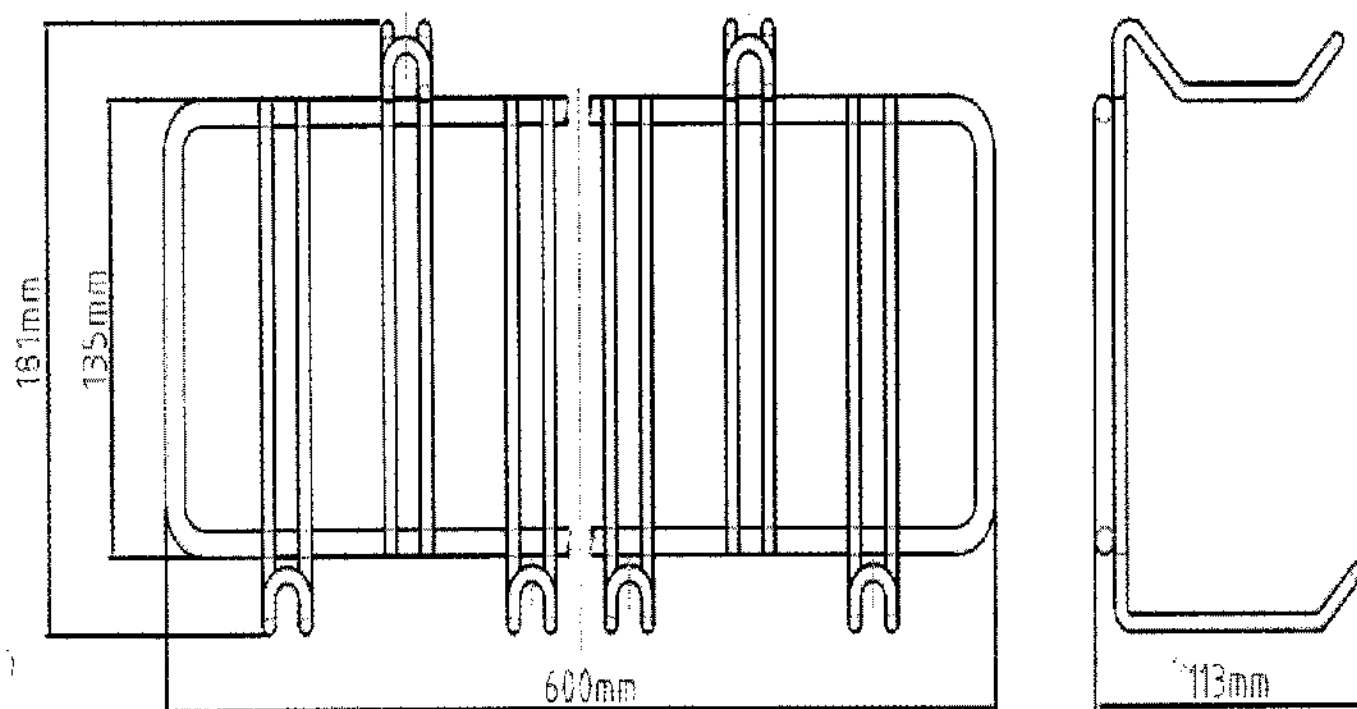


Держатель для планов для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами

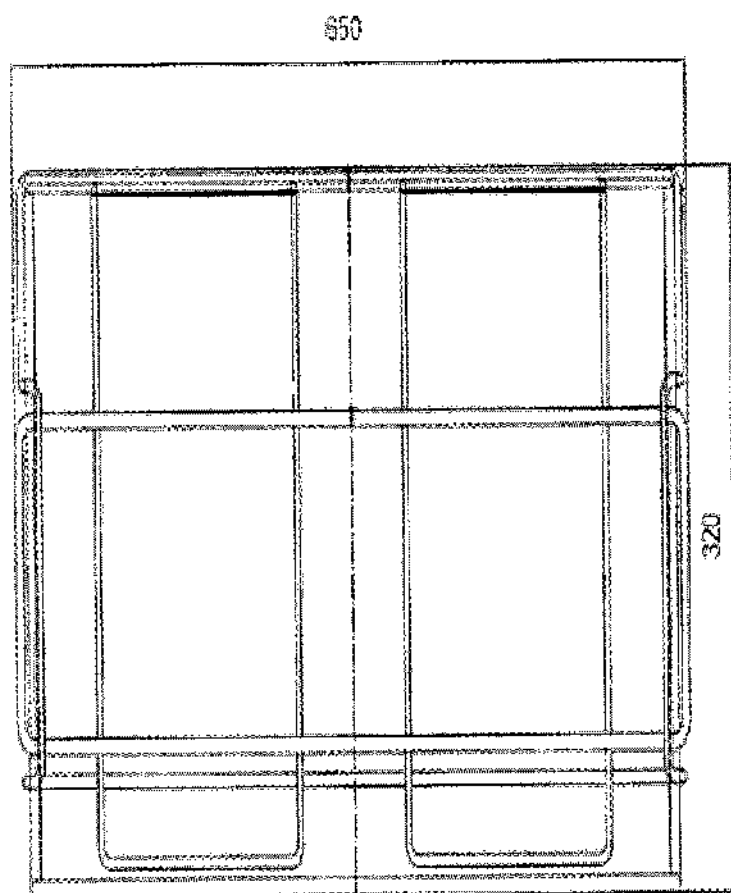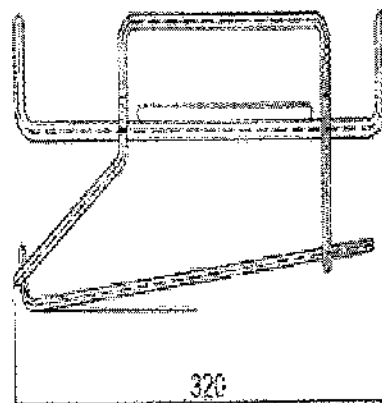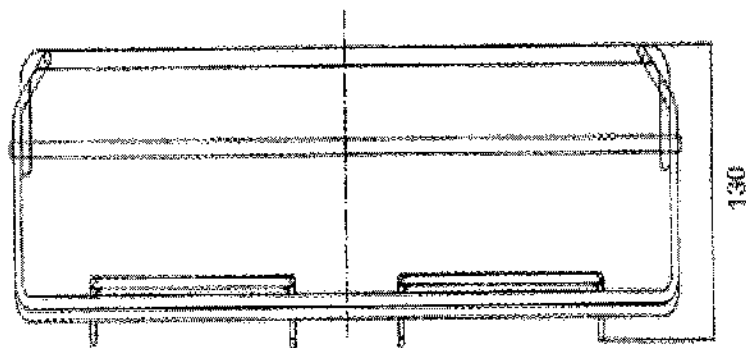

Держатель для контейнеров для настенного стеллажа, тележки с кронштейнами

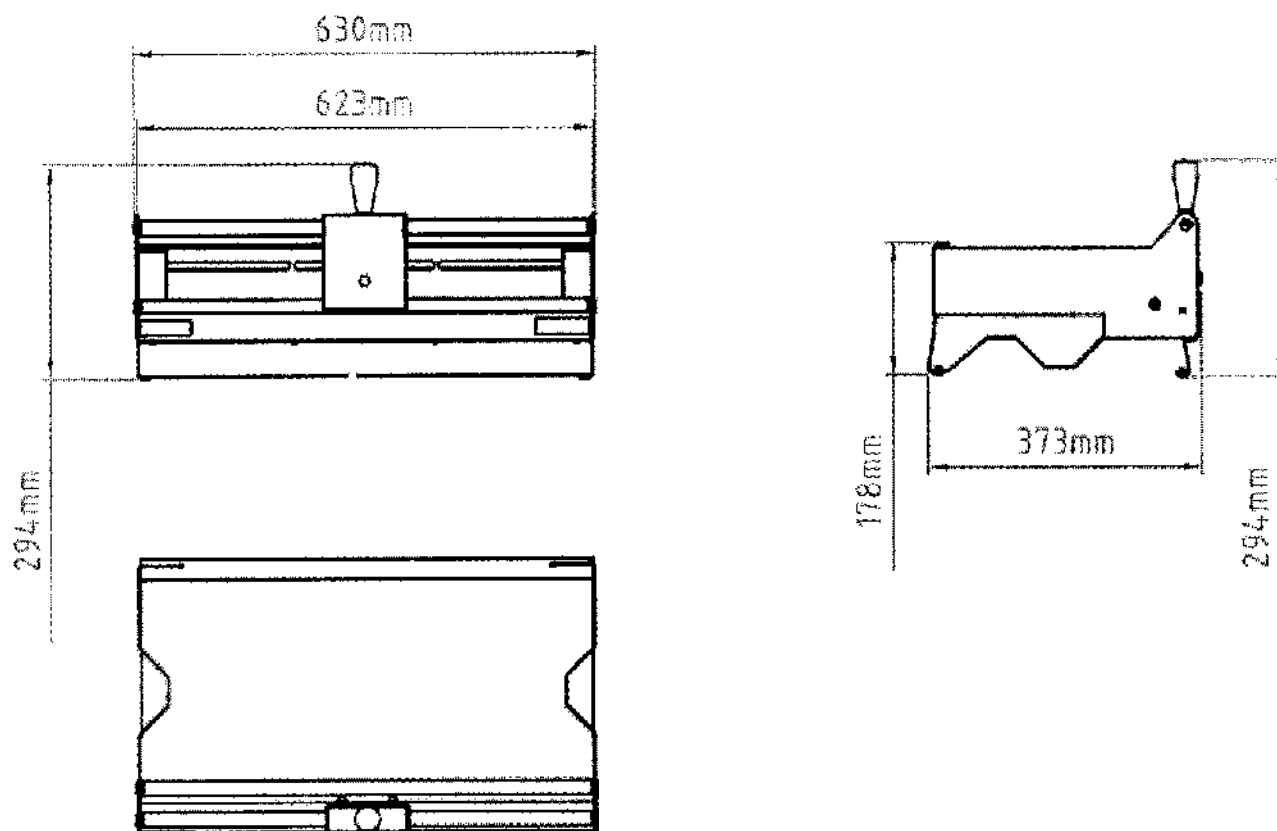


Держатель для рулонов с режущим устройством 1

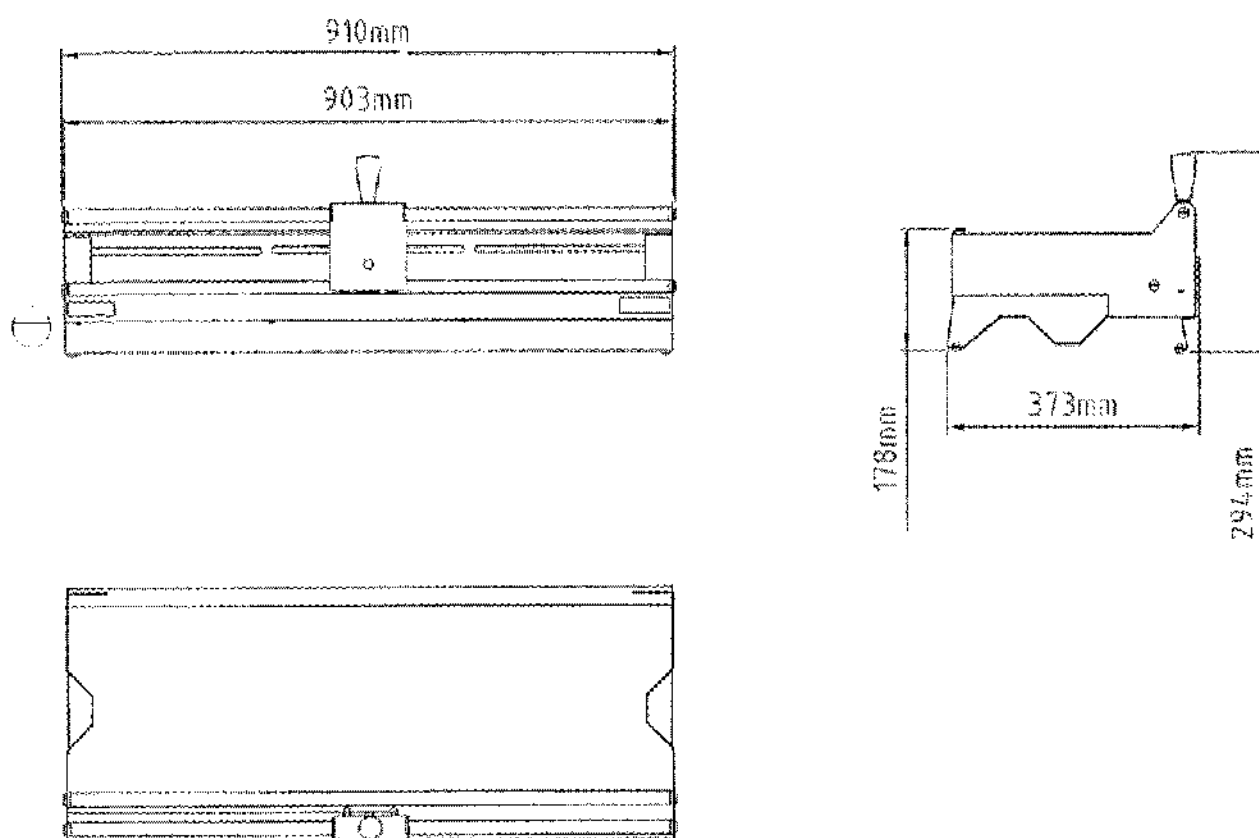


Держатель для рулонов с режущим устройством 2

21

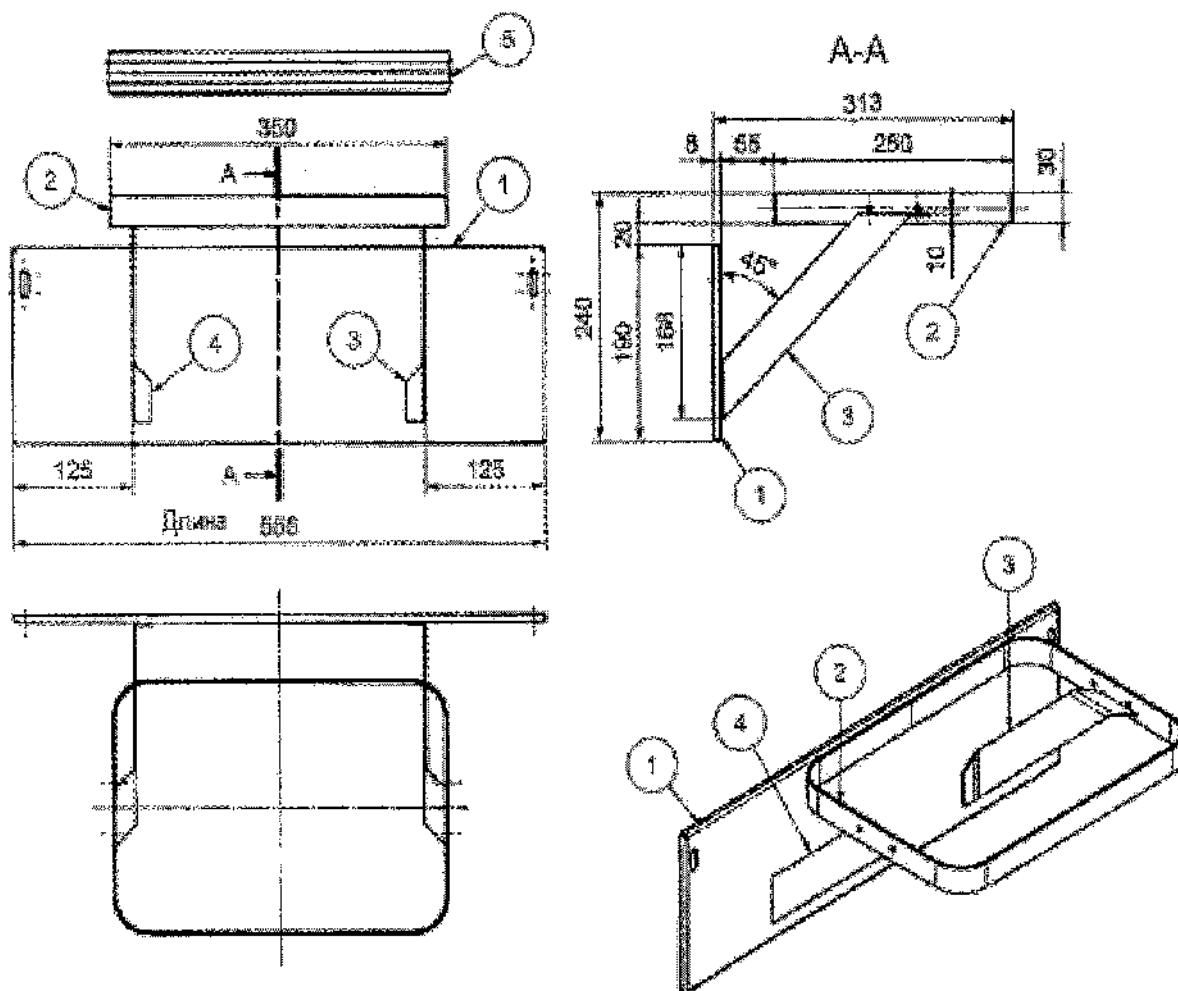


Держатель мешков для мусора или белья для тележек

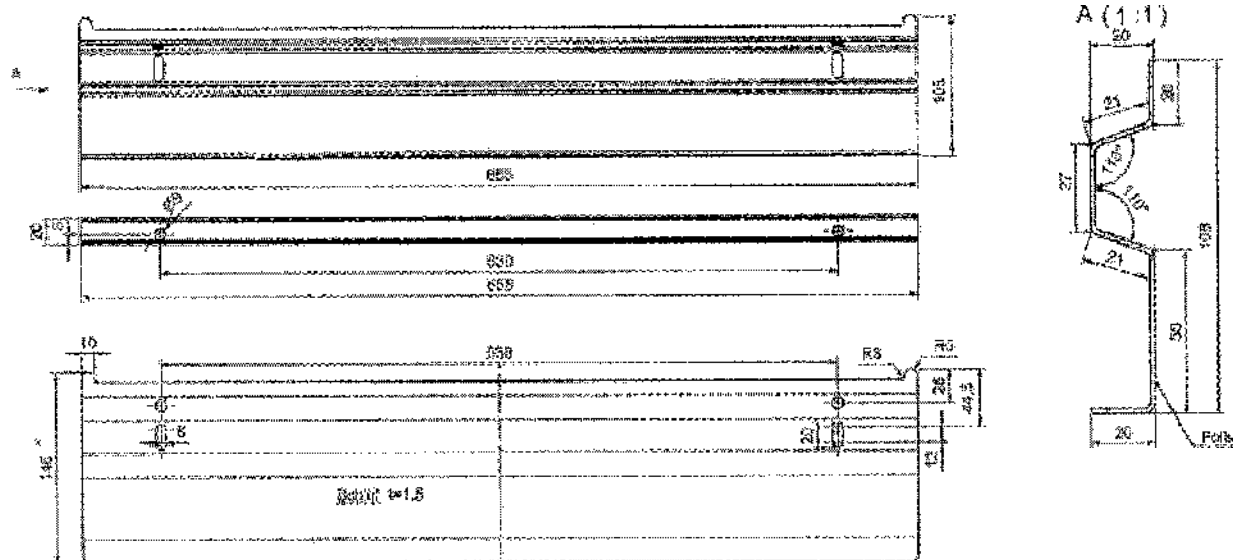

*Примечание к размеру 148: данный размер относится к производству изделия, а именно: перед формированием конечного изделия на формовочном аппарате стальная пластина, из которой затем формируется изделие, имеет длину 148 мм, что и показано на чертеже. После формирования стальной пластины, высота конечного изделия, как указано на чертеже и в Таблице 1 составляет 108 мм.

Универсальный держатель для крепления проволочных контейнеров всех моделей столов и тележек с кронштейнами

Чертеж колеса:

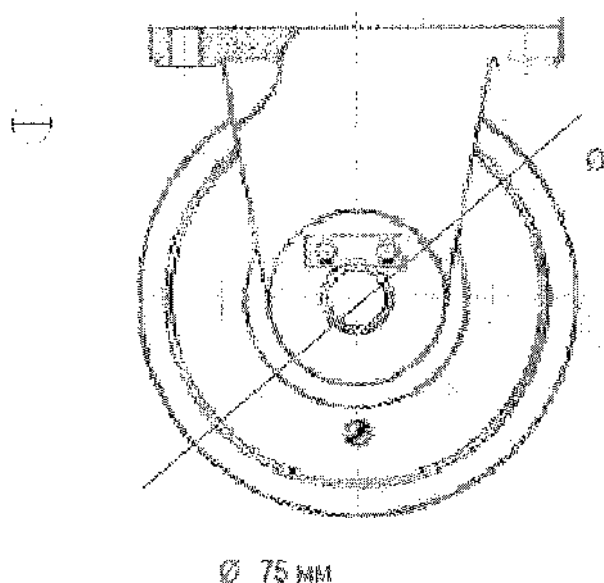


Приложение Б


(фотографические изображения изделий с ярлыками)

Ниже даны изображения изделий с ярлыками, а именно вид ярлыка и место его нанесения. Ярлык наносится способом наклеивания, в виде маленькой наклейки с обозначением изделия.


Изображение изделия с ярлыком

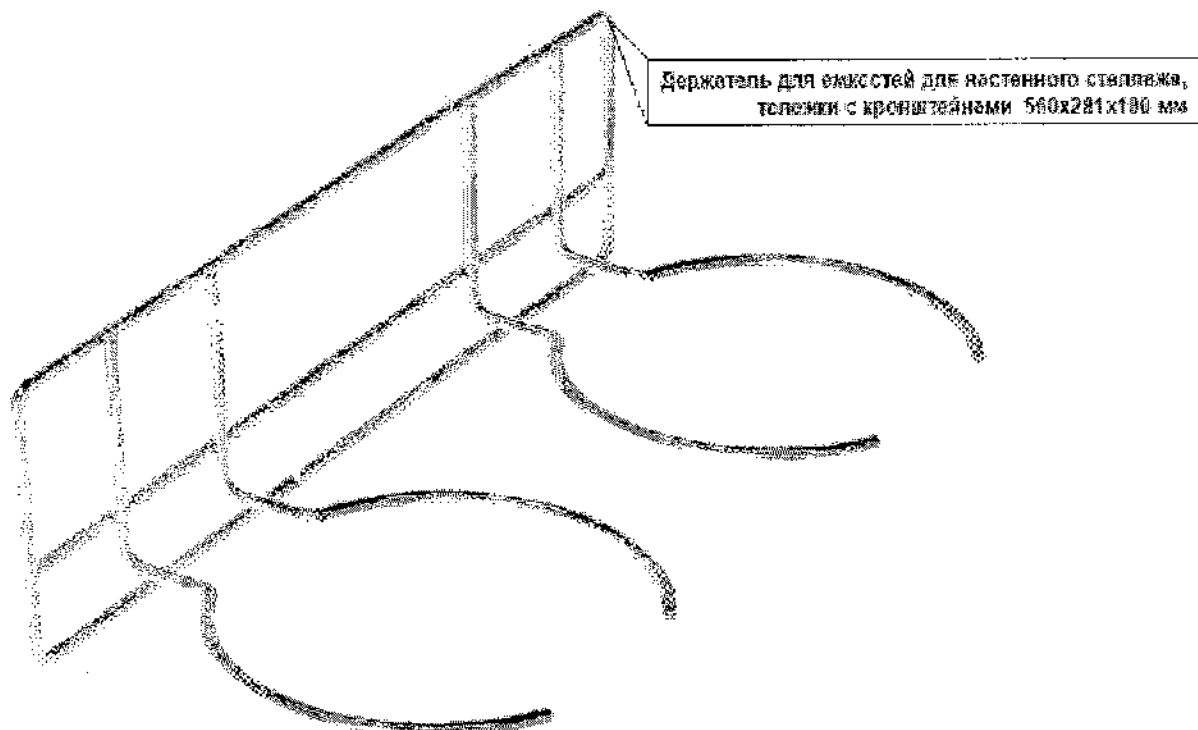


Изображение изделия с ярлыком

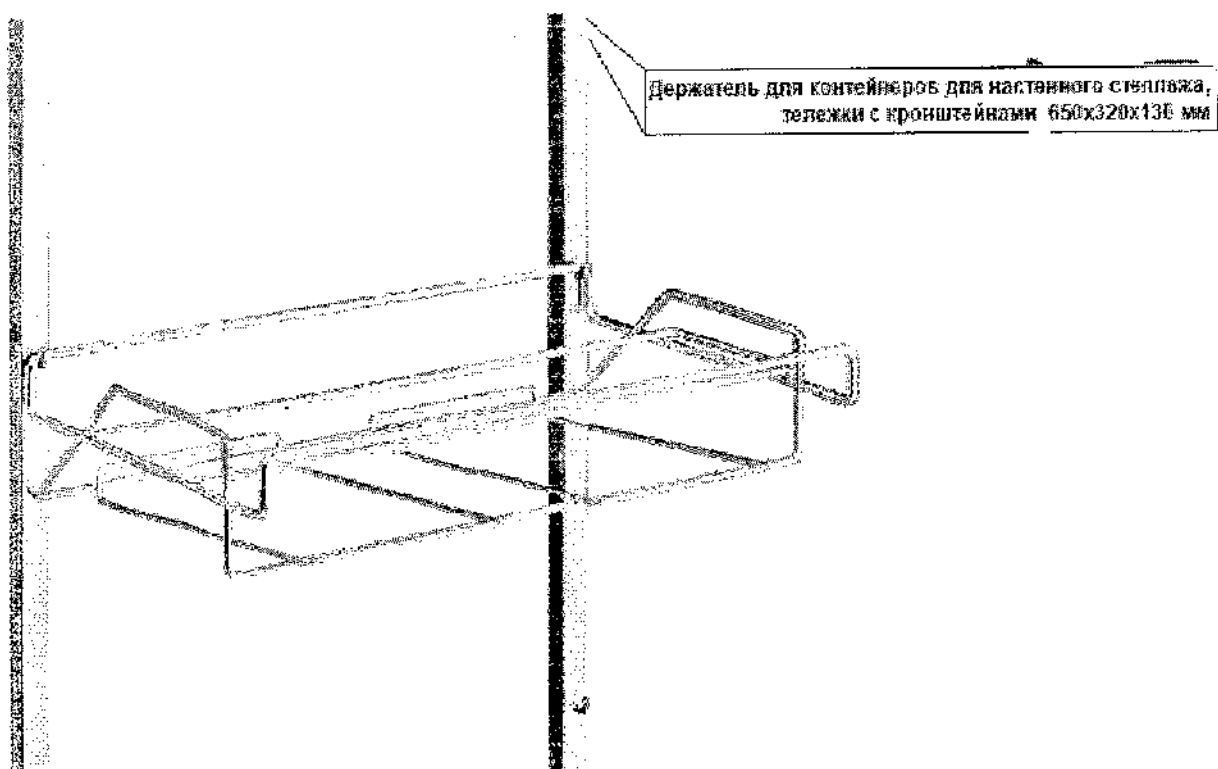

Изображение изделия с ярлыком

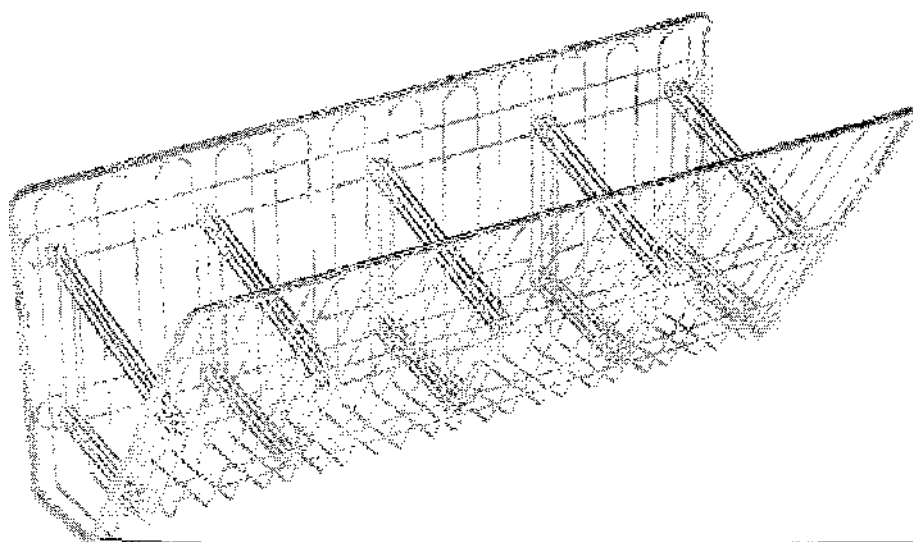


Держатель для мочеприемников для настенного стеллажа,
тележки с кронштейнами 560x248x272 мм

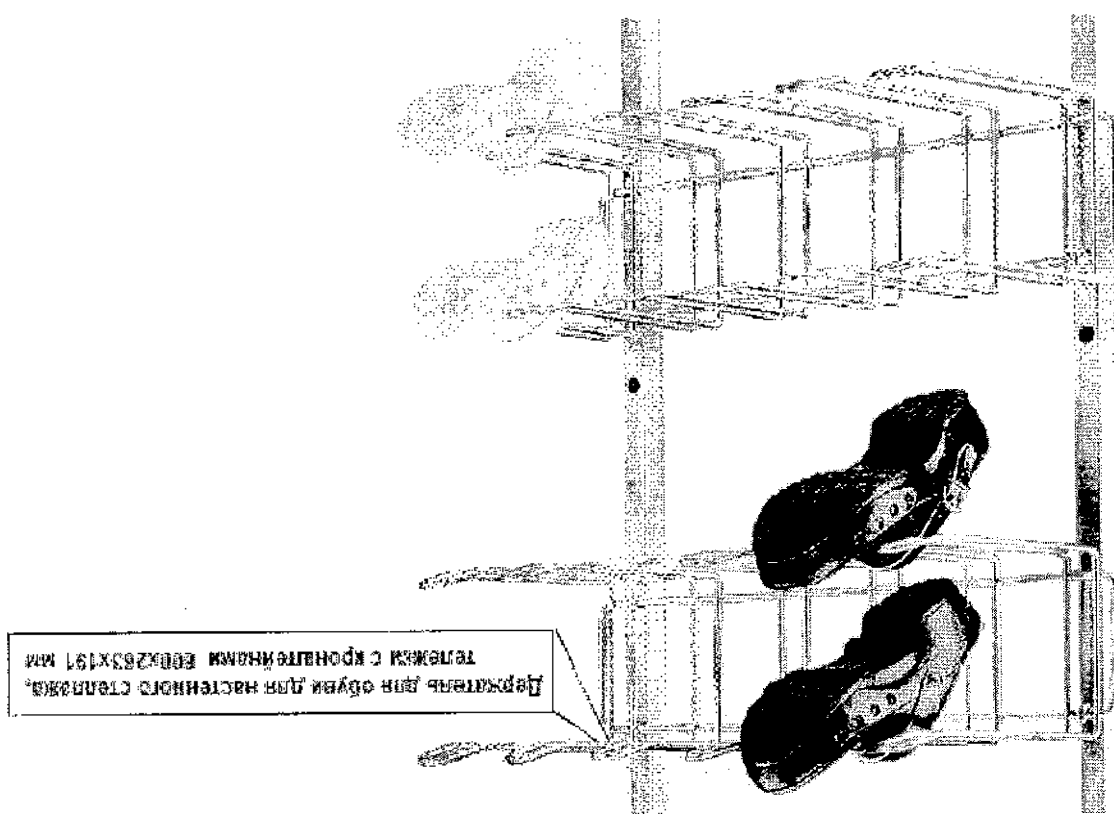

Изображение изделия с вариантами


22217
31.03.2021

Держатель рулонов с режущим устройством 2 для настольного станка и стенов всех модификаций 910х373х294 мм

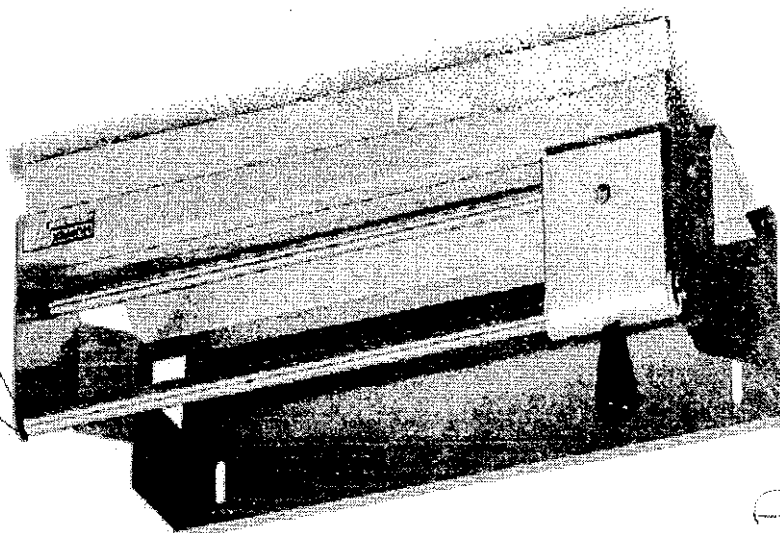

Исполнение изделия с ящиком

Держатель рулонов с режущим устройством 1 для настольного станка и стенов всех модификаций 910х373х294 мм

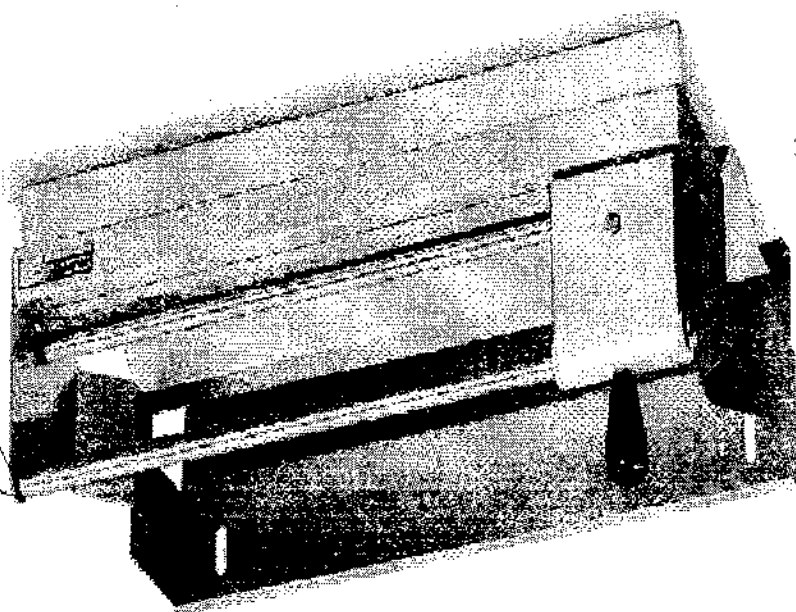


Исполнение изделия с ящиком

56


Изображение изделия с ярлыком


Держатель для шлангов для настенного стеллажа, тележки с
кронштейнами 300x110x181 мм

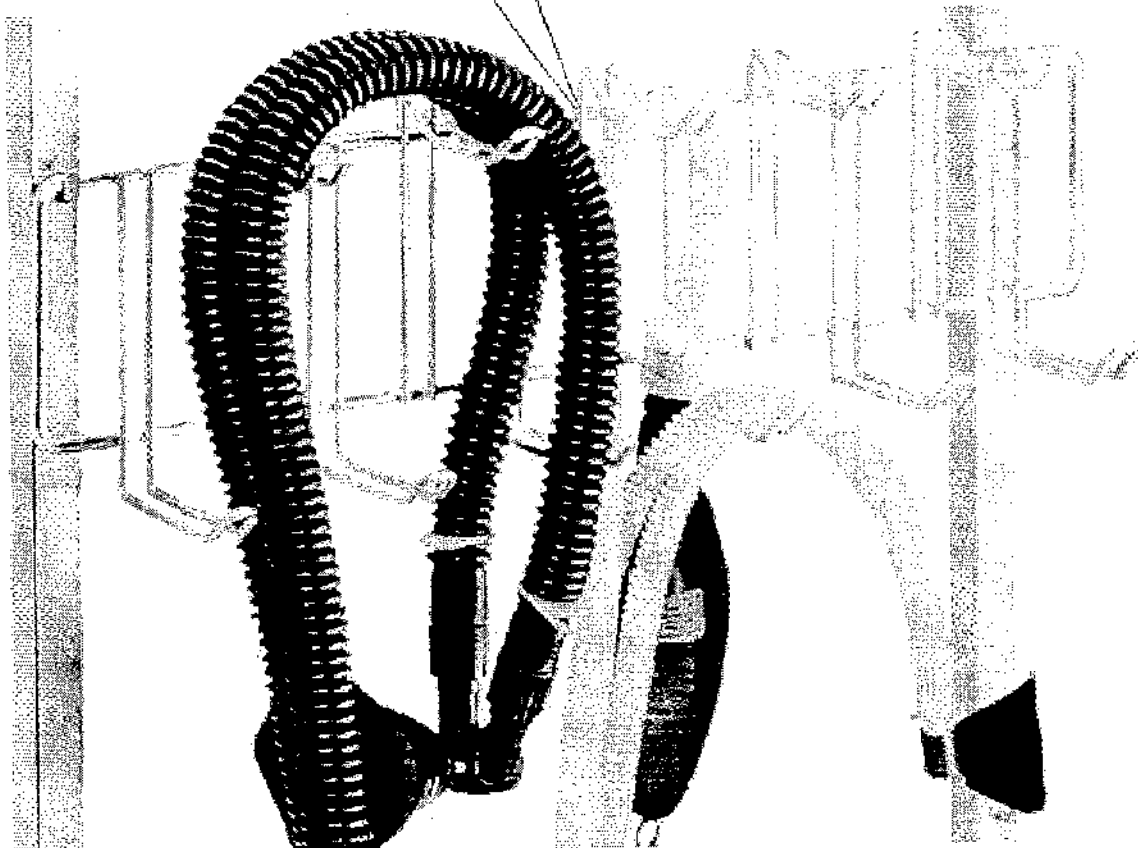

Изображение изделия с ярлыком

Держатель мешков для мусора или белья для теплых
555x313x240 мм

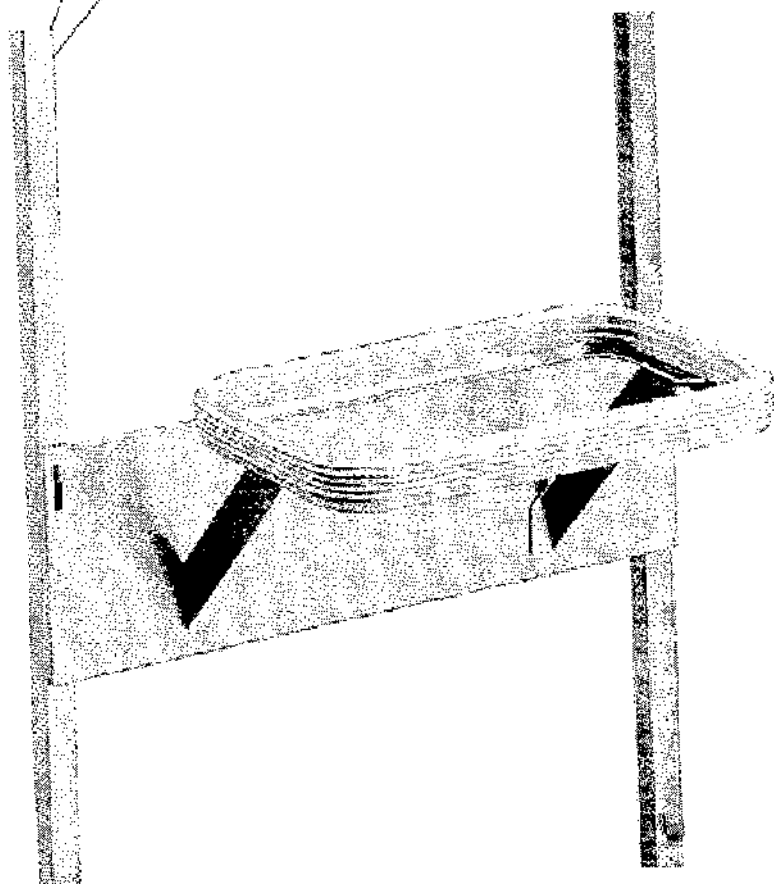


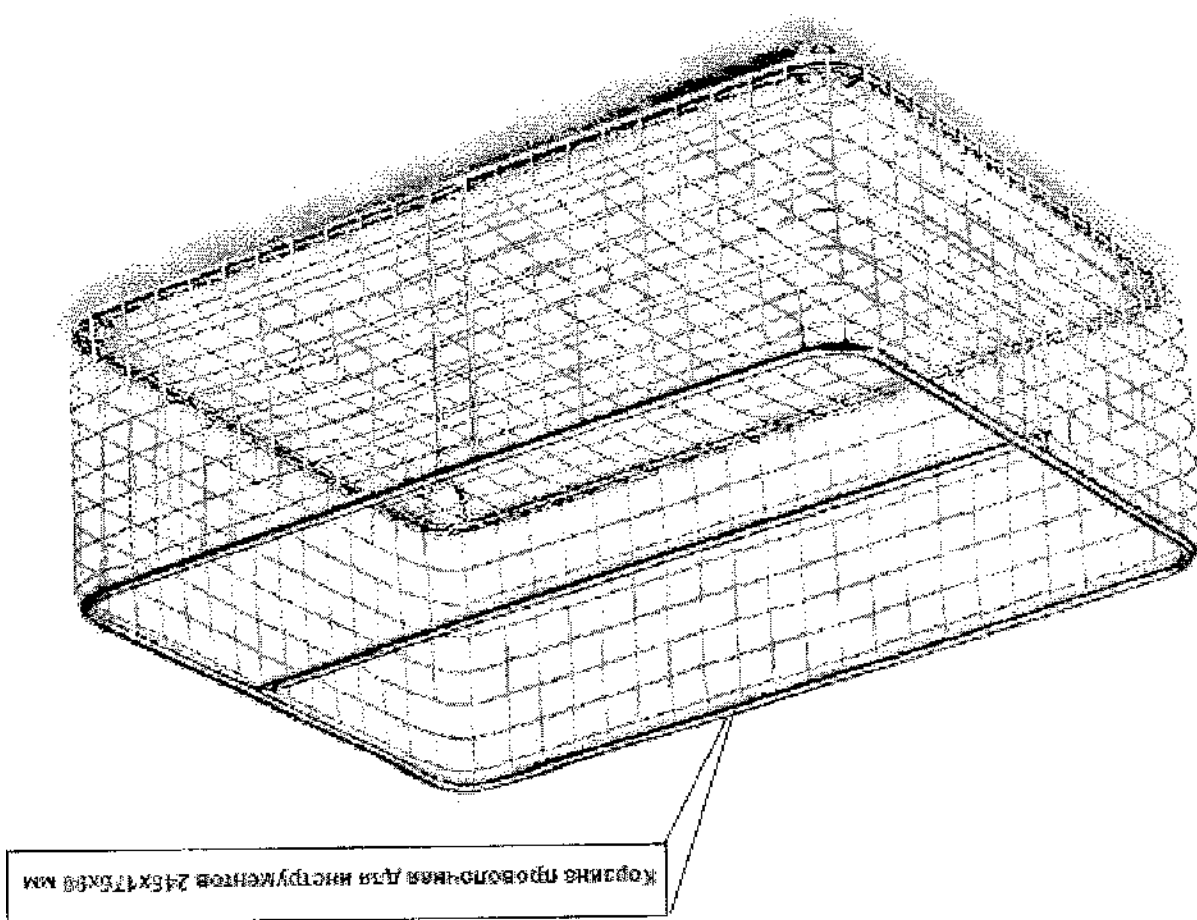

Изображение выполнено с помощью


Изображение изделия с ярлыком

Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 1 для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележки, стола
600x400x300 мм

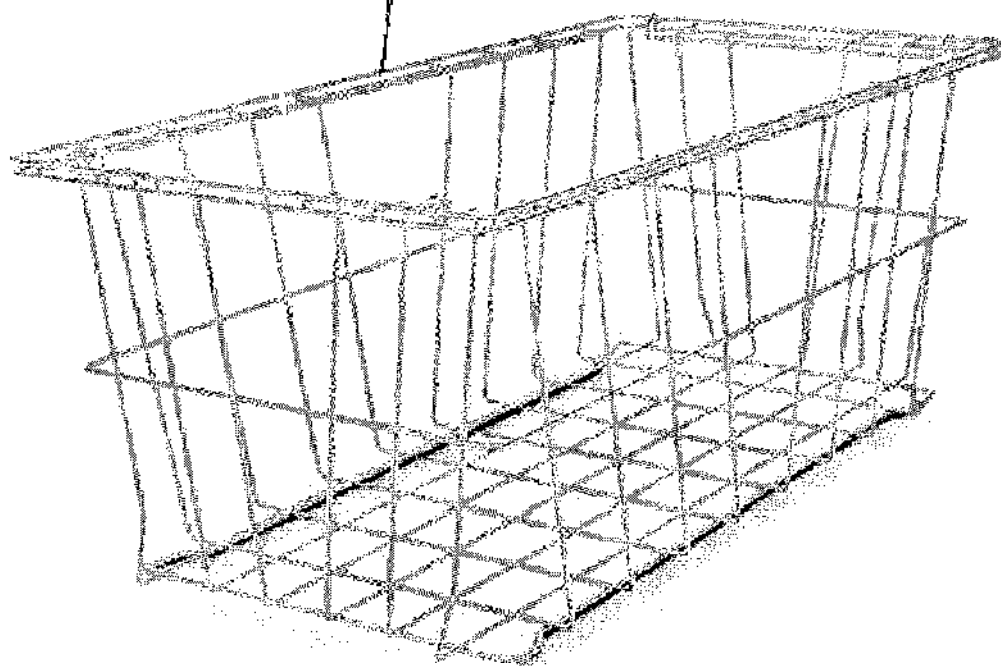


Изображение изделия с ярлыком

Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 2 для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележки, стола
600x400x180 мм

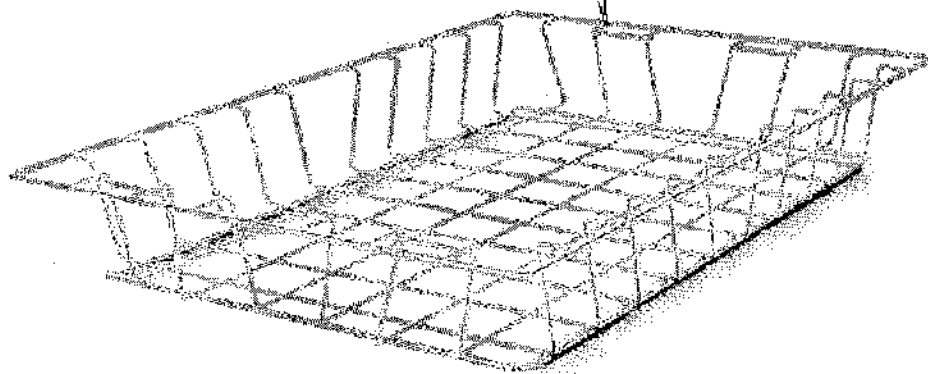


Изображение изделия с ярлыком

Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 3 для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележки, стола
600x400x150 мм

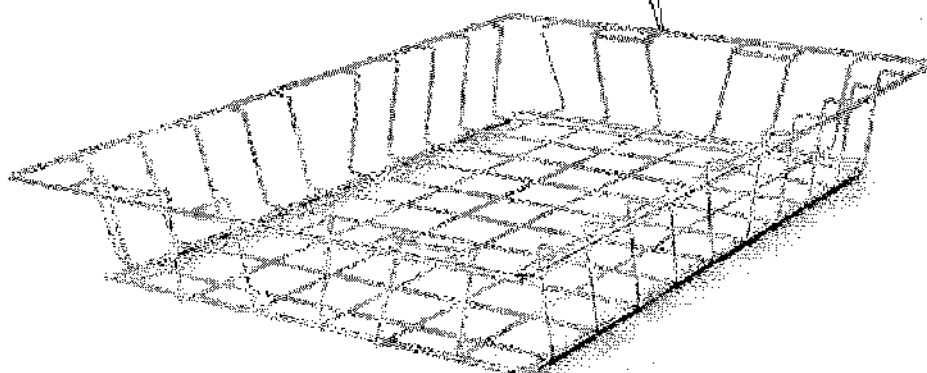


Изображение изделия с ярлыком


Корзина проволочная формат ИСО (ISO) 4 для всех моделей стационарного или мобильного стеллажа, тележки, стола
800x400x100 мм

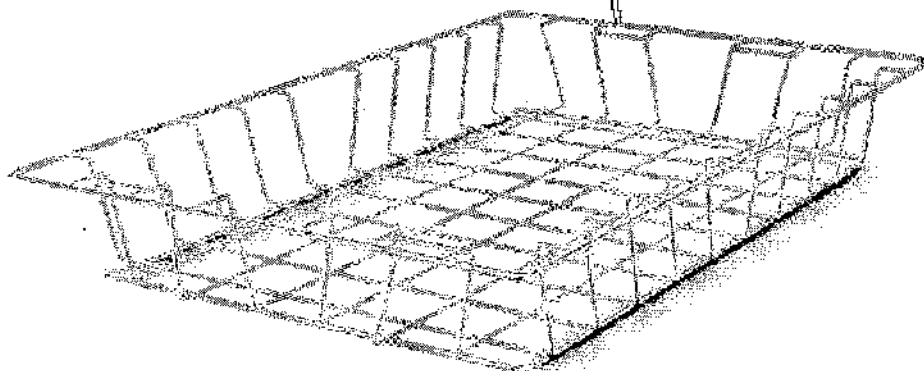

Изображение изделия с ярлыком


Корзина проволочная формат СТУ (StE) 1 для всех моделей
стеллажей, тележек, столов 600х350х300 мм

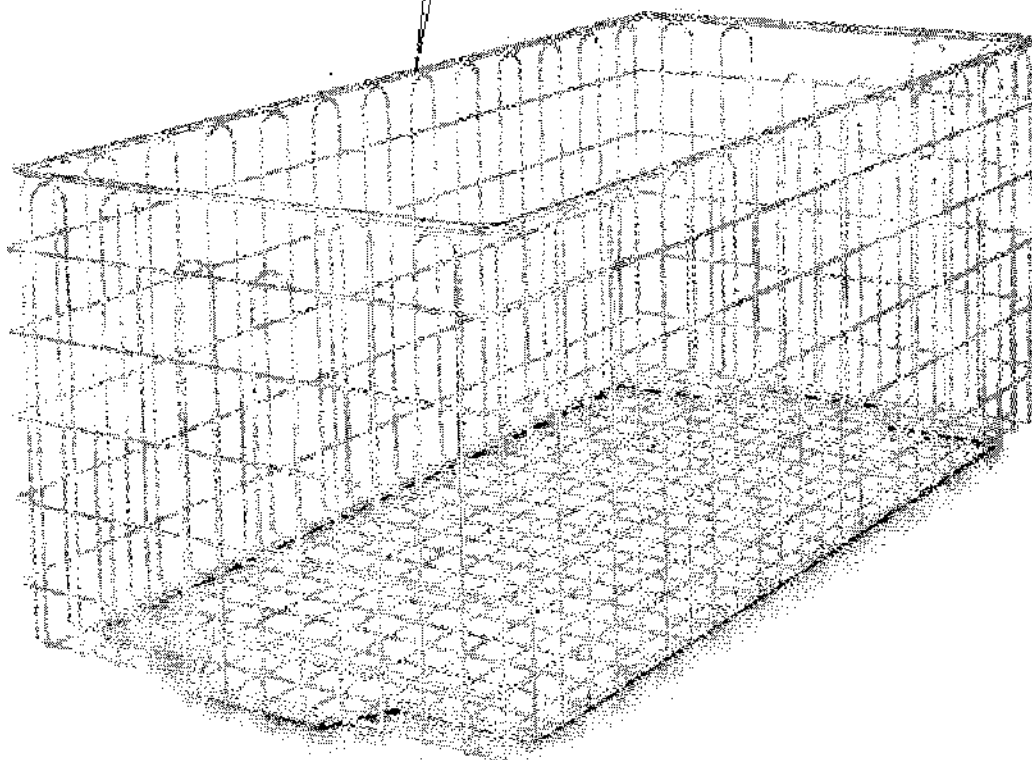

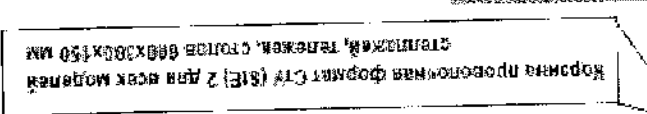


 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

22217
31.03.2021

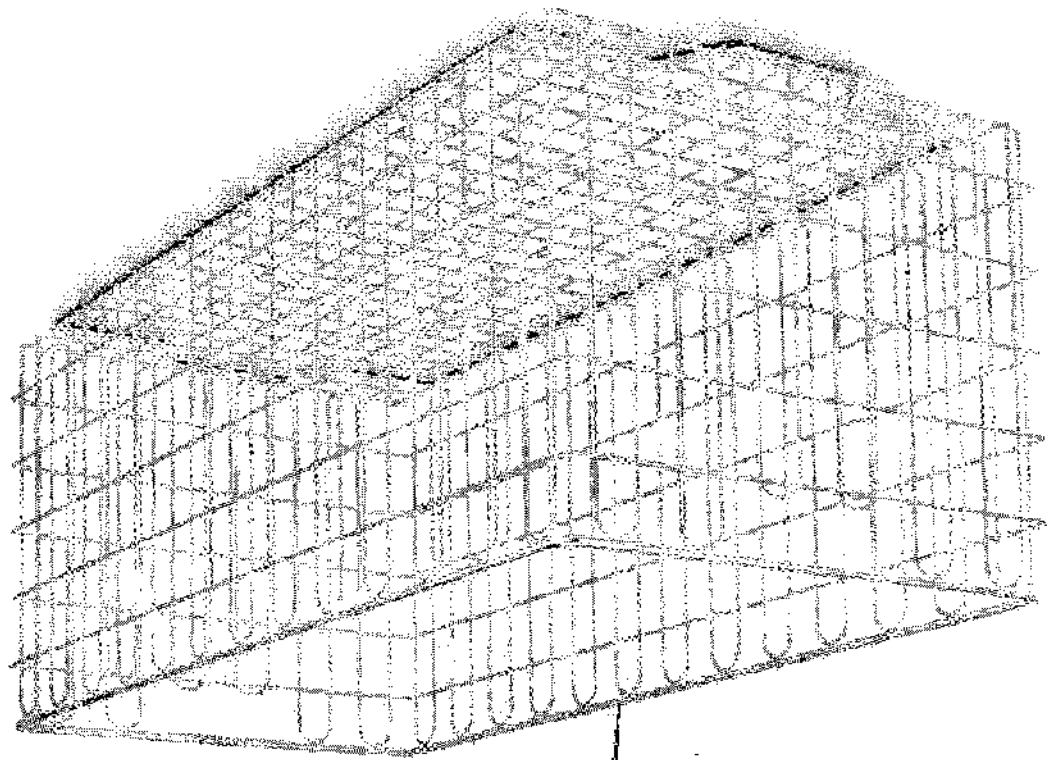

Корзина проволочная формат City (SIF) 3 для всех моделей
стендажей, телешов, стенов 576x288x285 мм


Изображение изделия с ярлыком

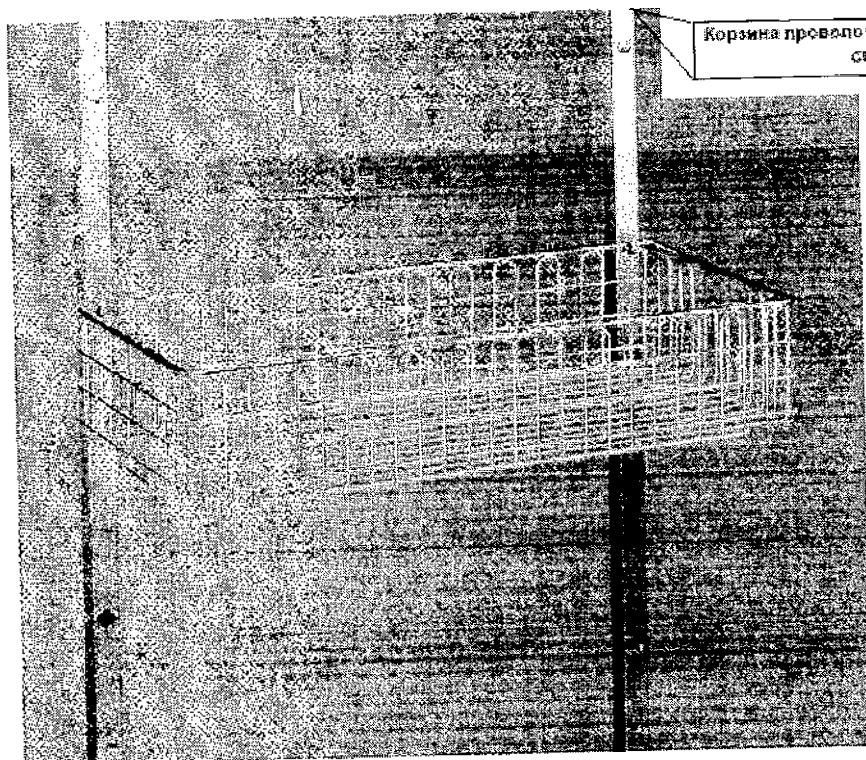

Корзина проволочная формат СХУ (SHE) 4 для всех моделей
стеллажей, тележек, столов 675х280х135 мм


108

Изображение изделия с ярлыком

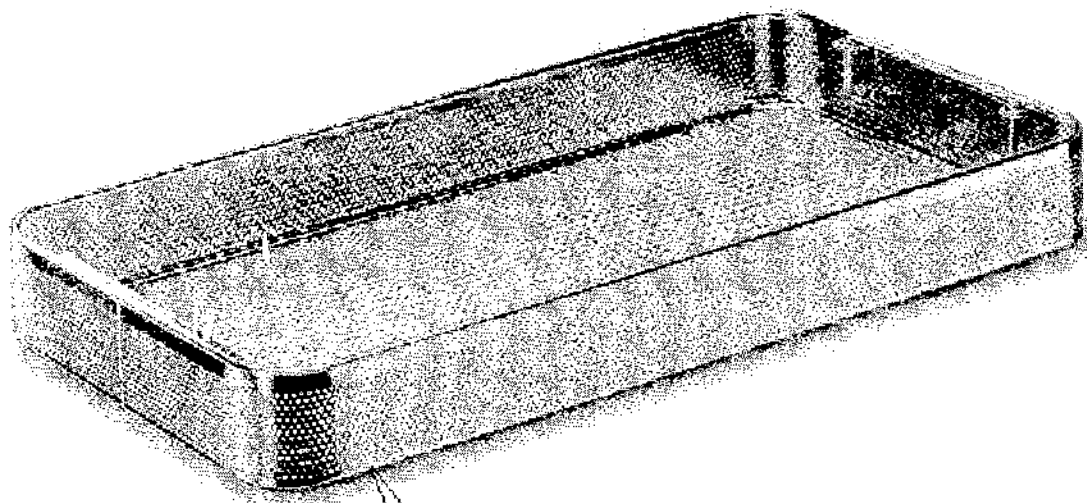


Корзина сетчатая с перфорированными стенками для всех моделей стеллажей, тележек, столов 450x250x100 мм

Изображение изделия с ярлыком

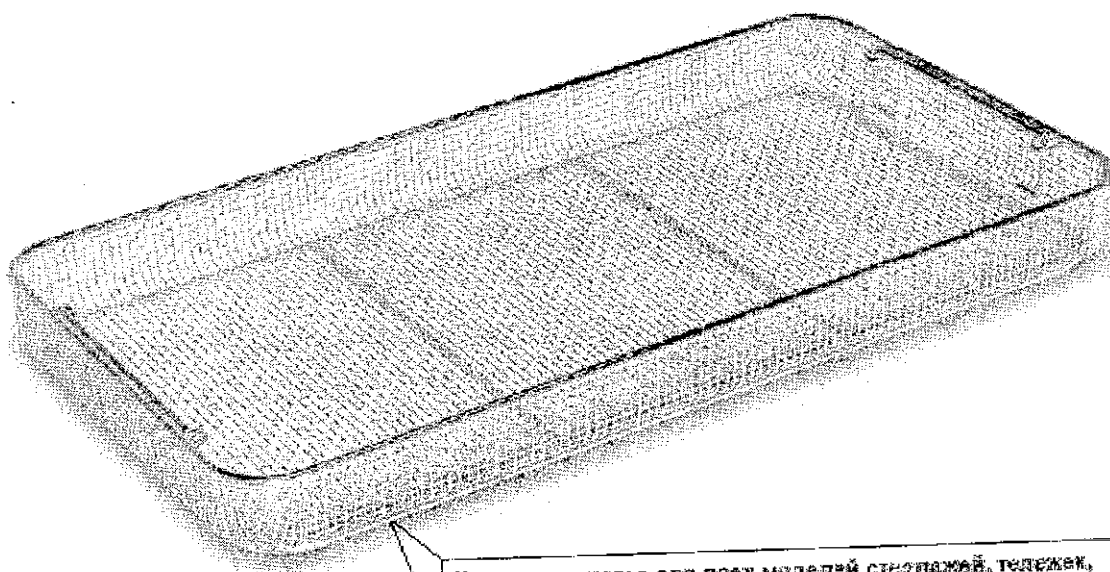

Корзина сетчатая для всех моделей стеллажей, тележек, столов 450x250x100 мм

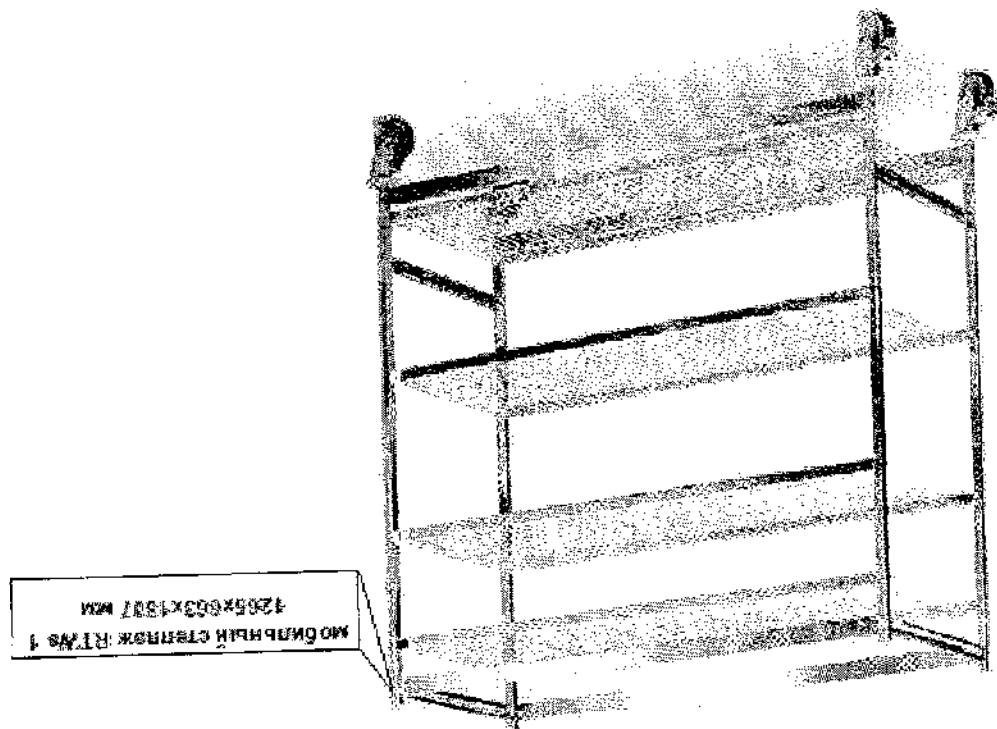


Изображение изделия с рыбком


Изображение изделия с ярлыком

мобильный стеллаж РТ№ 2
1065x663x1807 мм



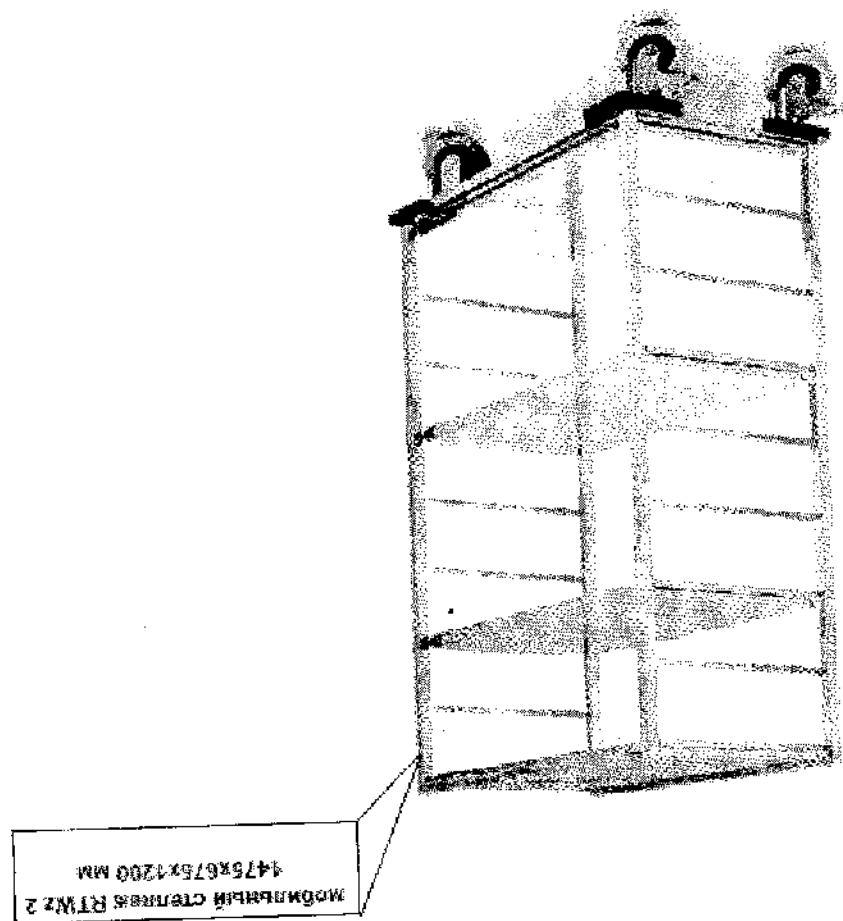

Изображение изделия с опцией

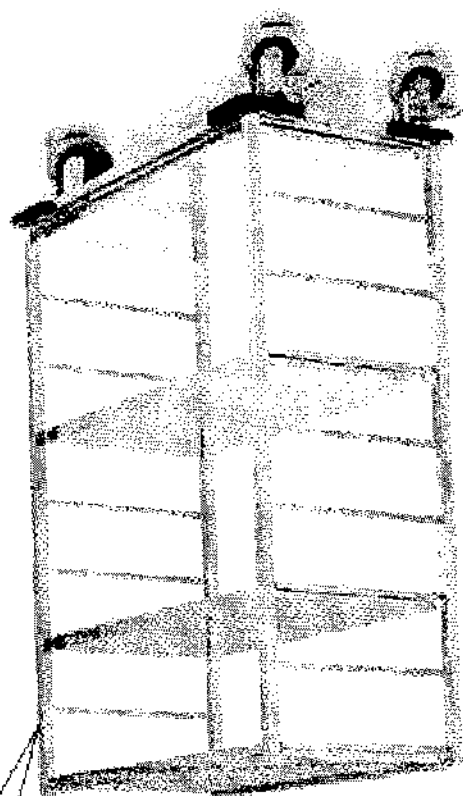

МОДУЛЬНАЯ СТЕЛЛАЖНАЯ Р1WZ 1
1075x675x1200 мм


Изображение изделия с вариантами

Изображение изделия с ярылькон

Настенный стеллаж (настенные шины) 1,2,3,4,5,6,7
43x40x700/800/1050/1300/1400/1600/1750 мм



22217 
31.03.2021

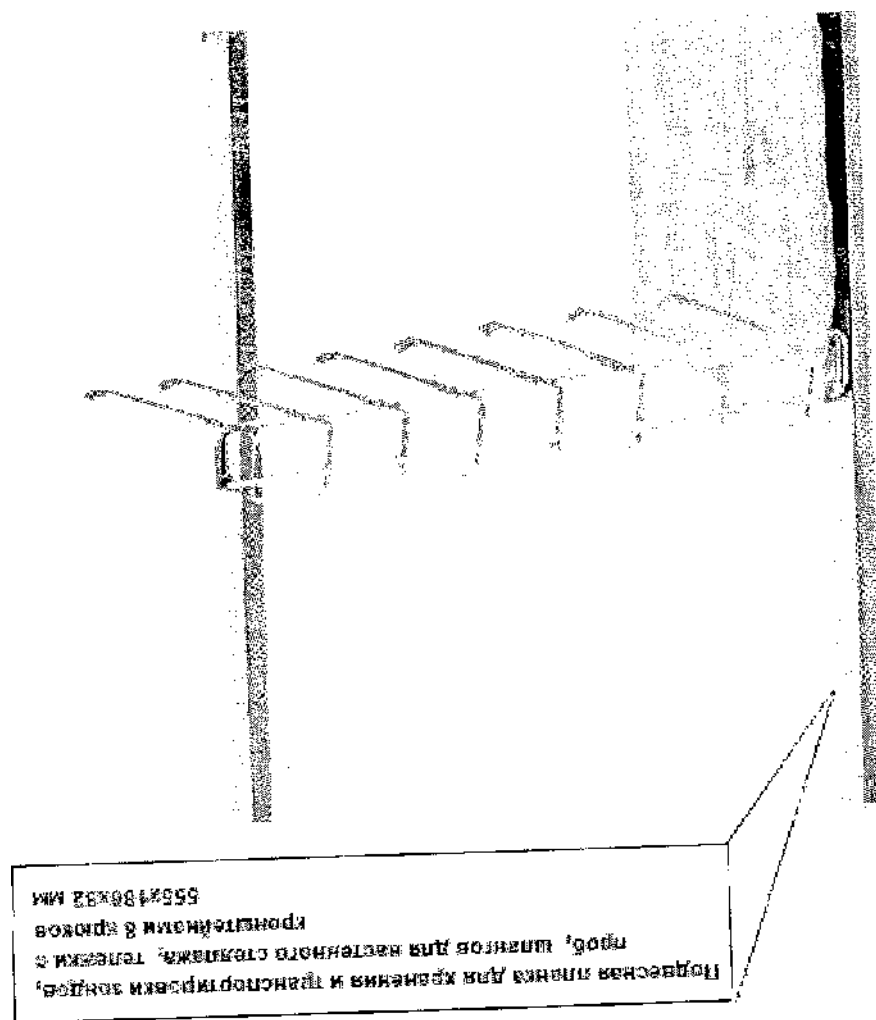


Изображение изделия с ютником


Изображение изделия с ярлыком

Подвесная планка для хранения и транспортировки
зондов, проб, шлангов для настенного стеллажа,
тележки с кронштейнами 6 крюков
636x186x71 мм




Изображение изделия с ярлыками

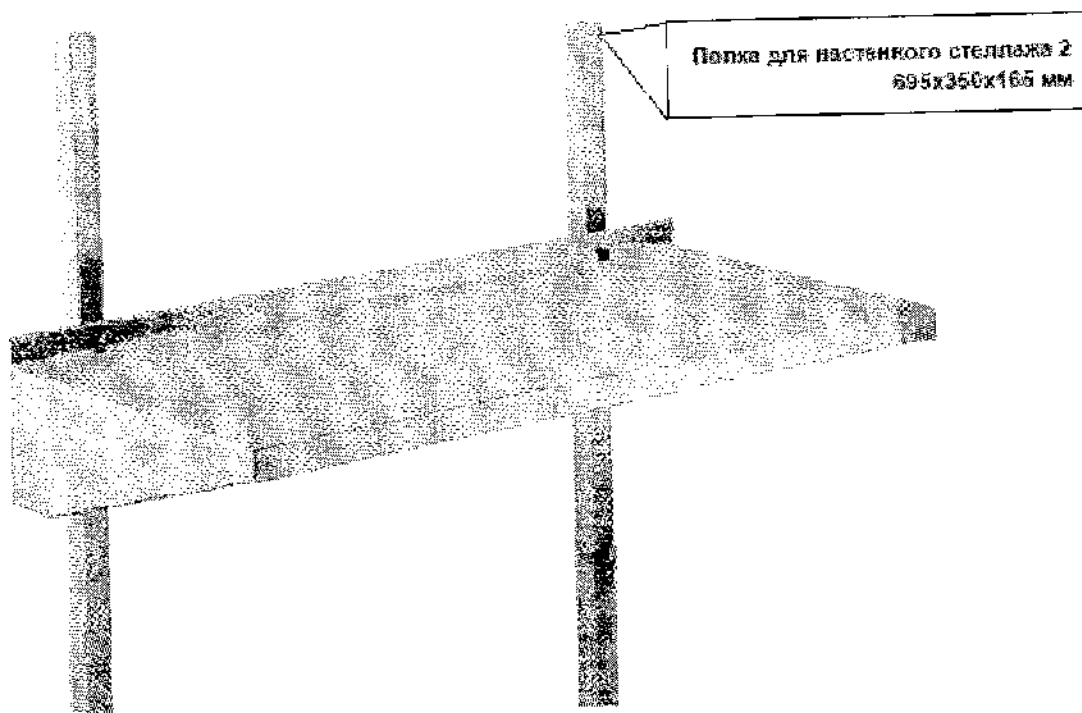

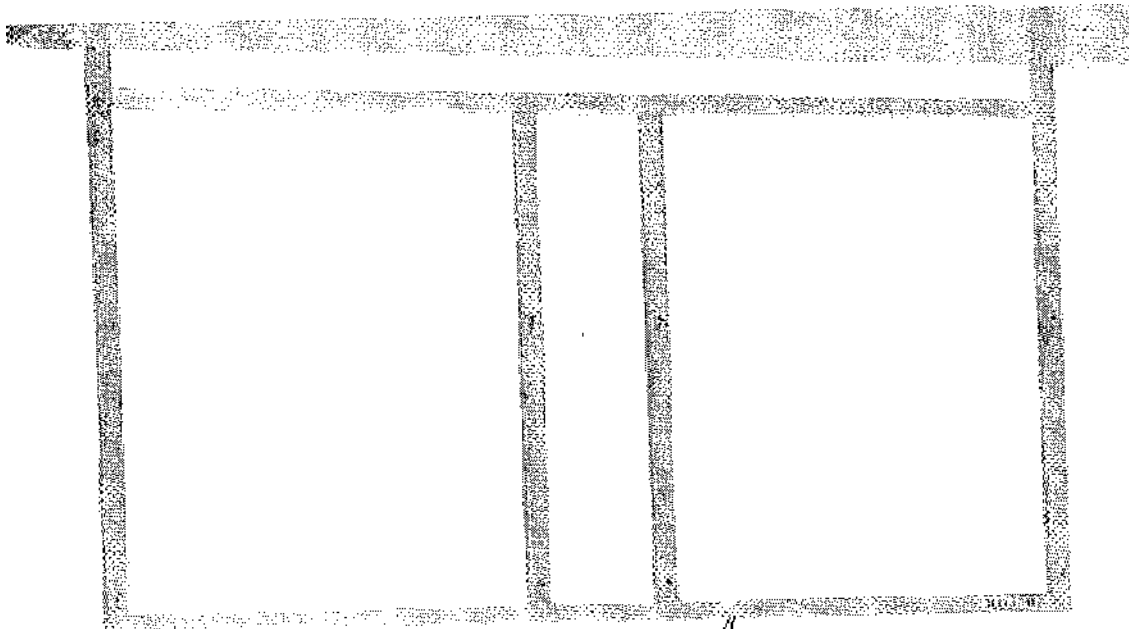

Рамы № 1 с креплением для стенов модели AT-O, AT-Z, PT
1250x40x1447 мм


Изображение изделия с разъемом

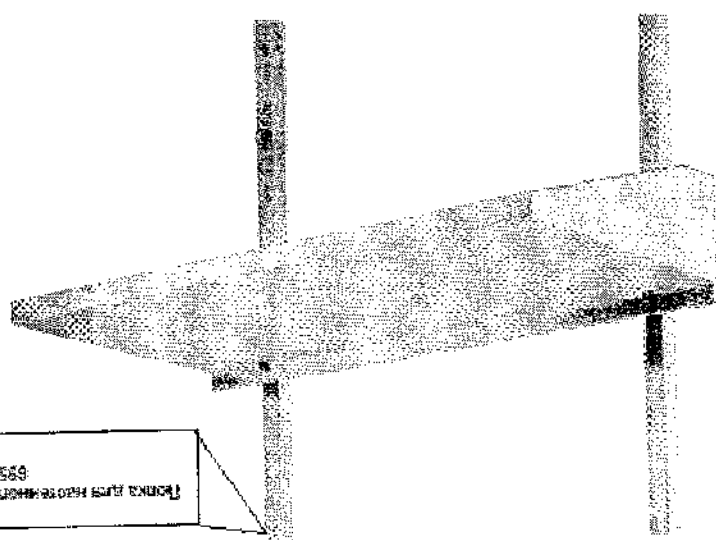

Полка для хранения стенов № 1
850x40x150 мм


Изображение изделия с разъемом

Изображение изделия с ярлыком

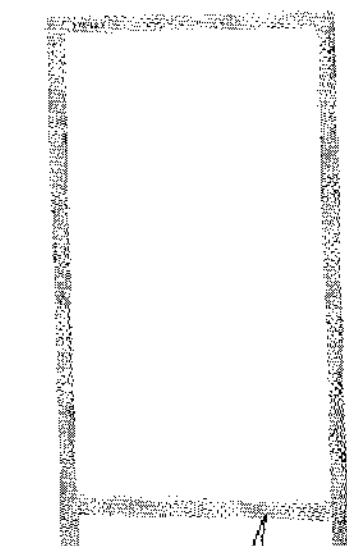


Рама № 2 с прочками для столов моделей АТ-О, АТ-З, РТ
555x49x1447 мм

Изображение изделия с ярлыком

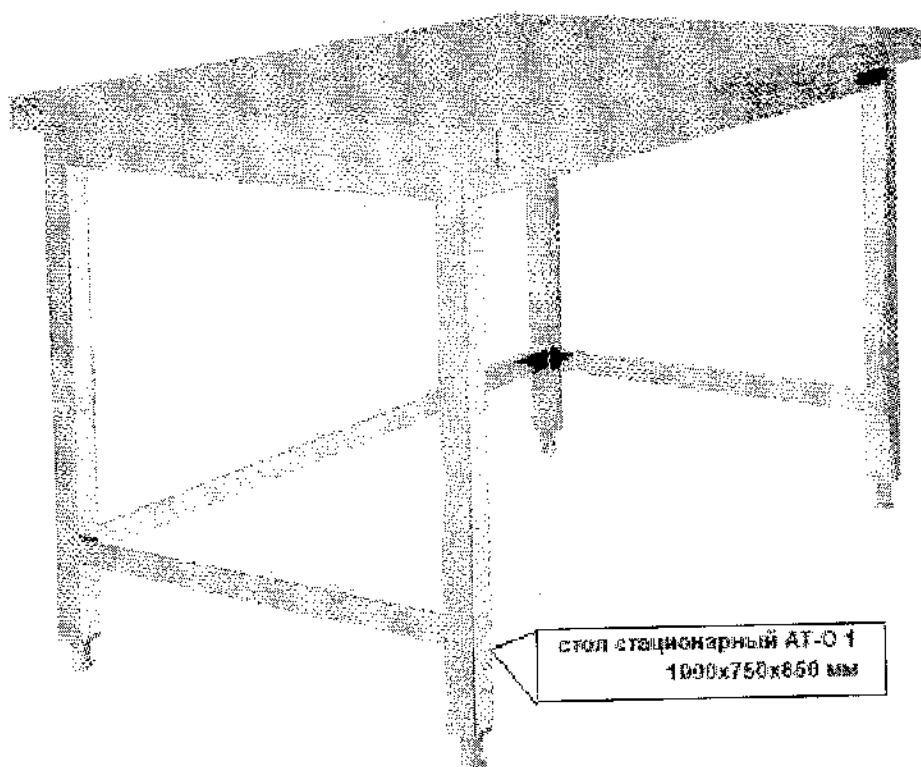



стол стационарный АТ-О 1
1000x750x860 мм

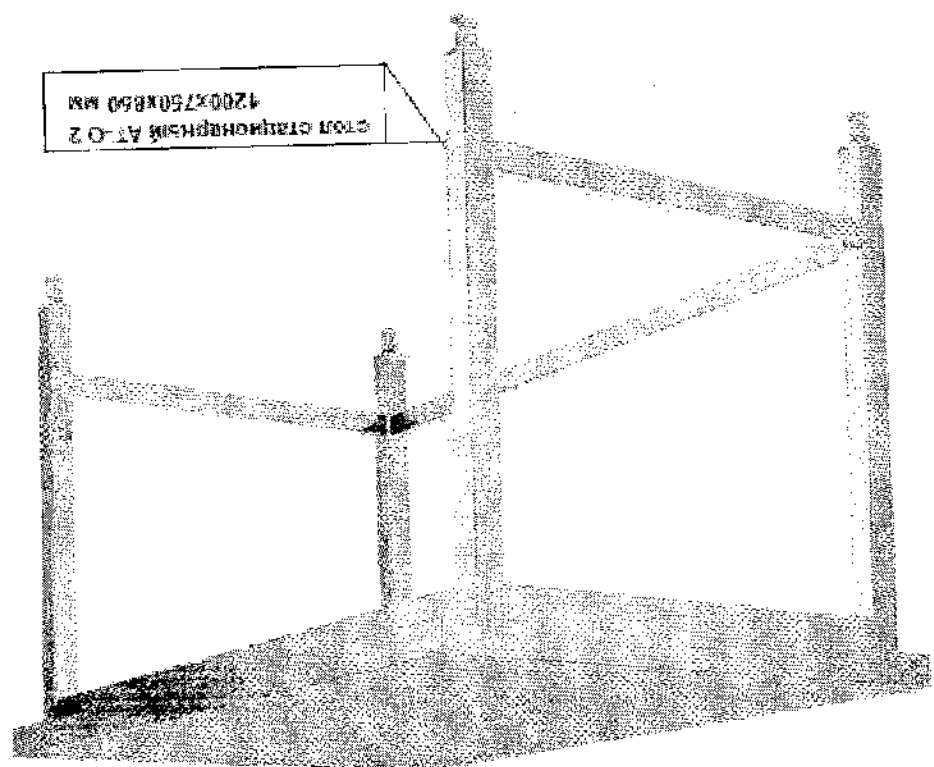

Изображение изделия с ярыком


Изображение изделия с ярлыком

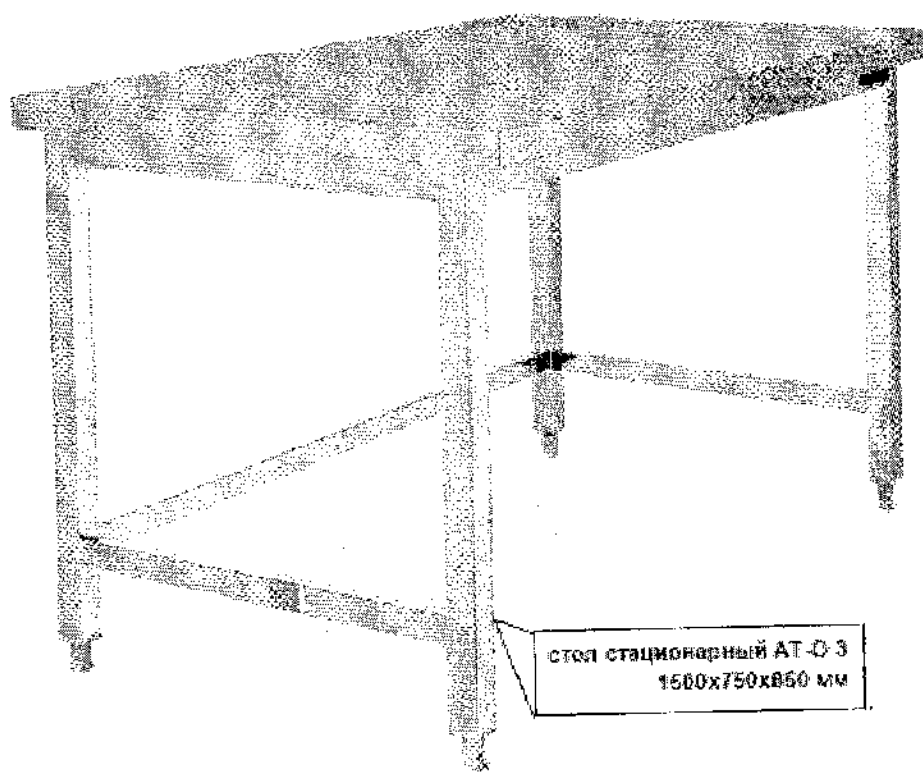

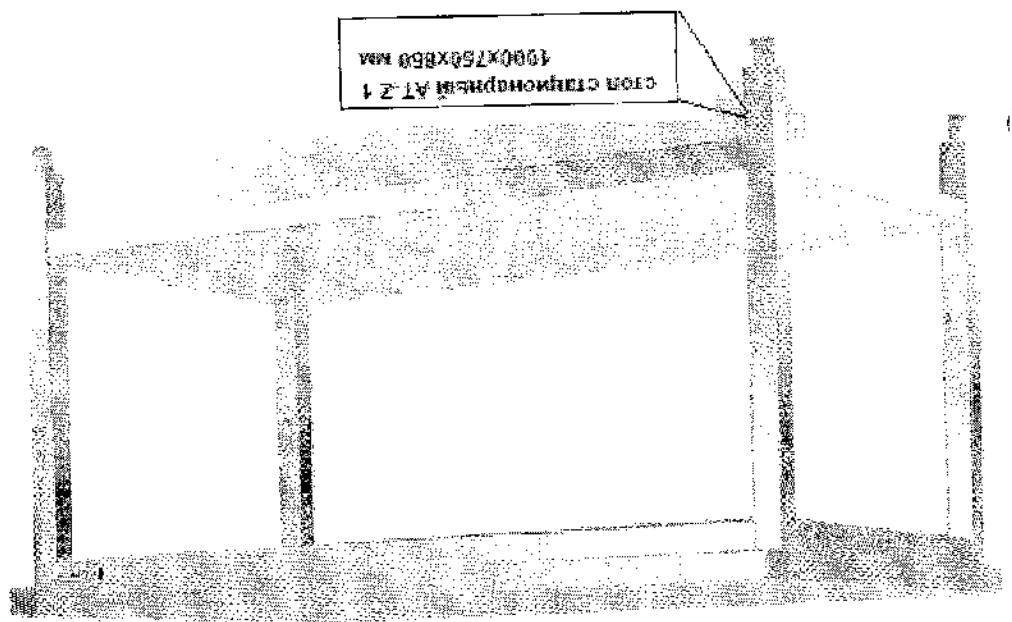


Изображение изделия с ящиком


Изображение изделия с ярлыком

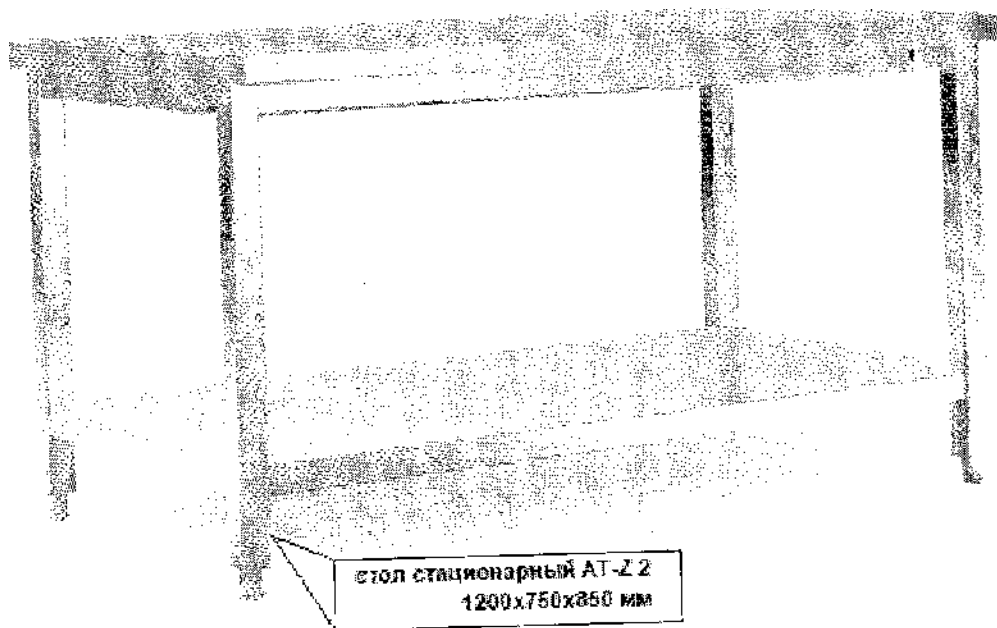

Изображение изделия с ярлыком

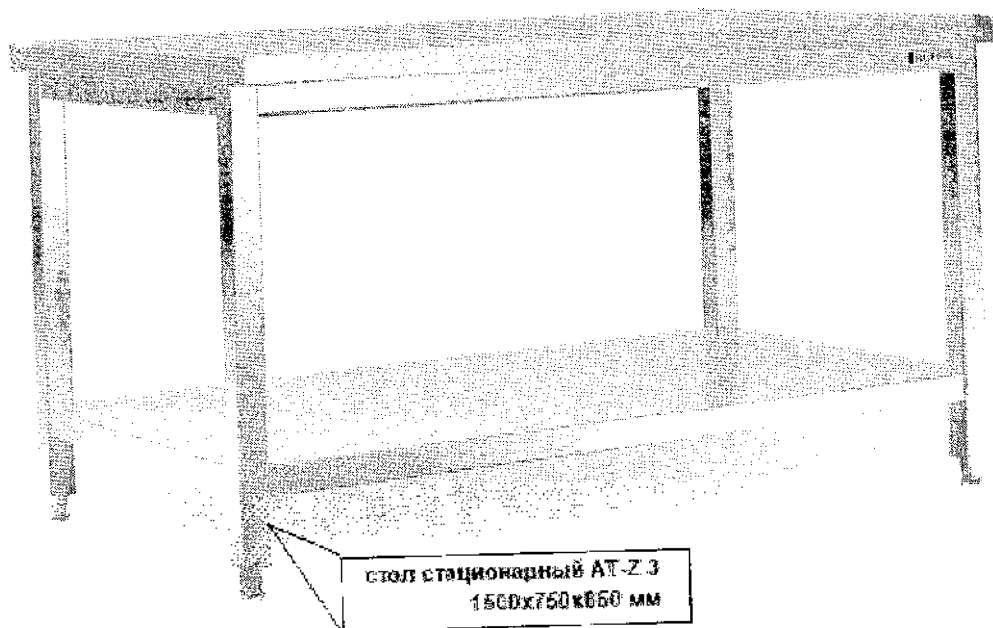

Изображение изделия с ярлыком

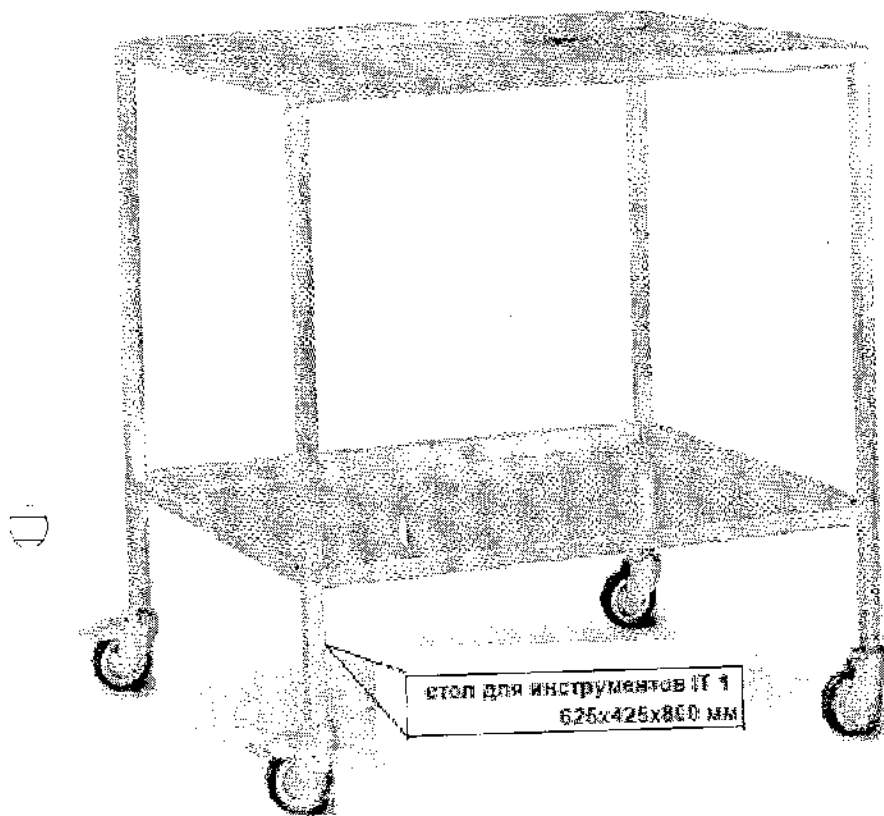


Изображение изделия с ярлыком



Изображение изделия с ярлыком



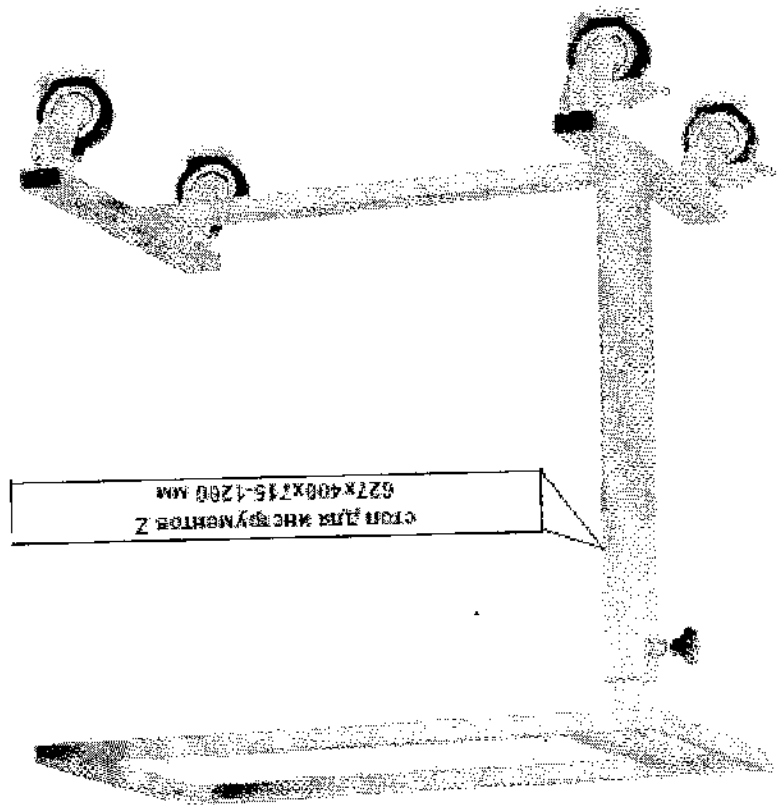


Изображение изделия с разрывом

126


Изображение изделия с ярлыком




Изображение изделия с ярлыками

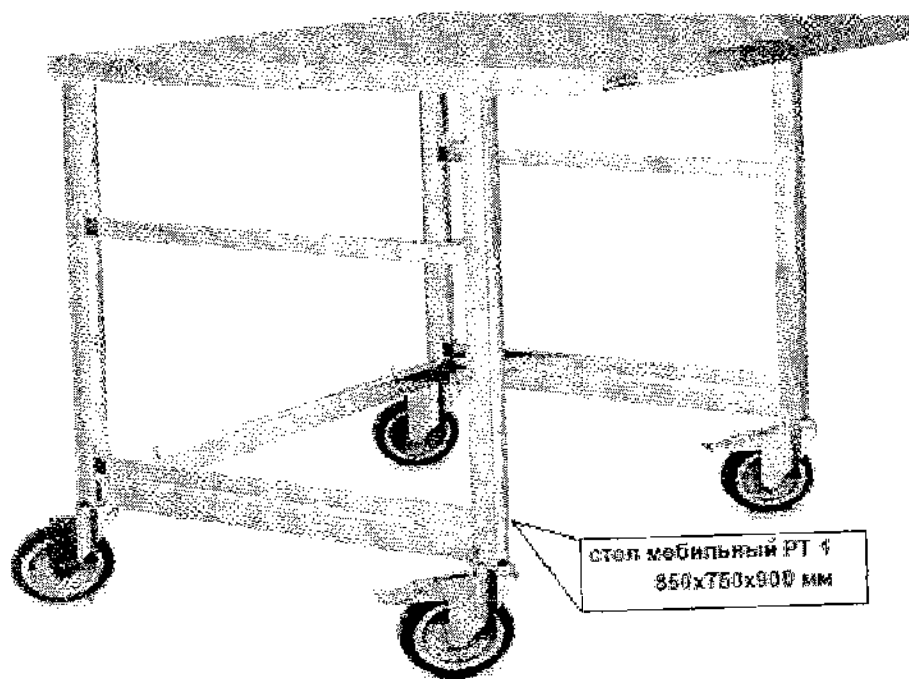


Изображение изделия с ярлыками

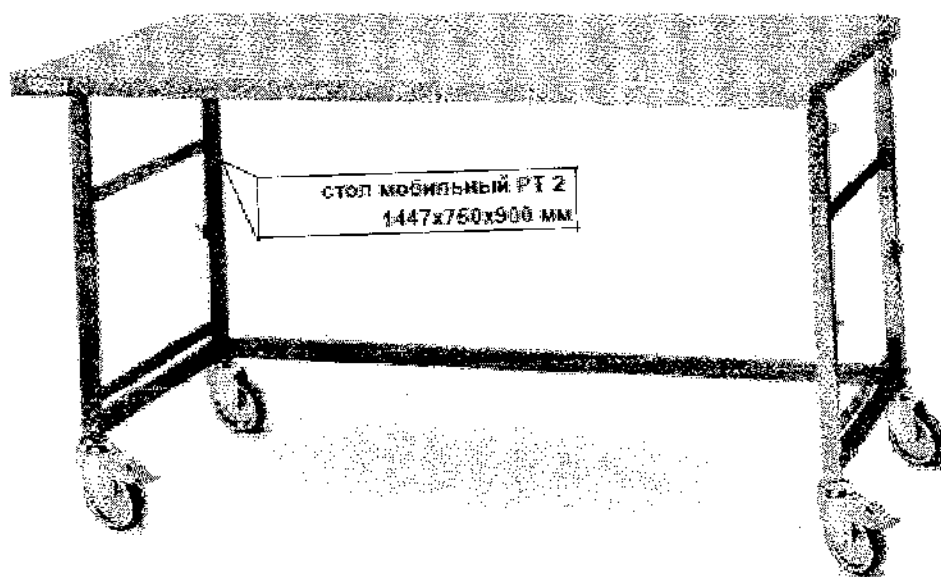

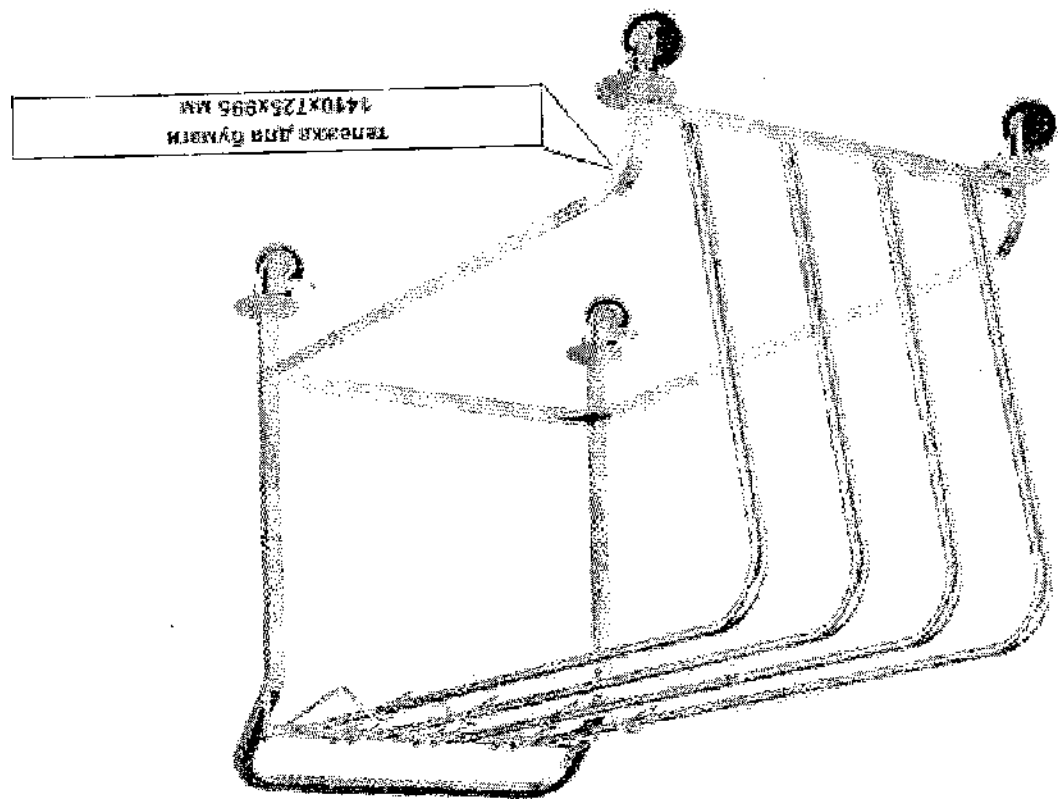


Изображение изделия с ящиком

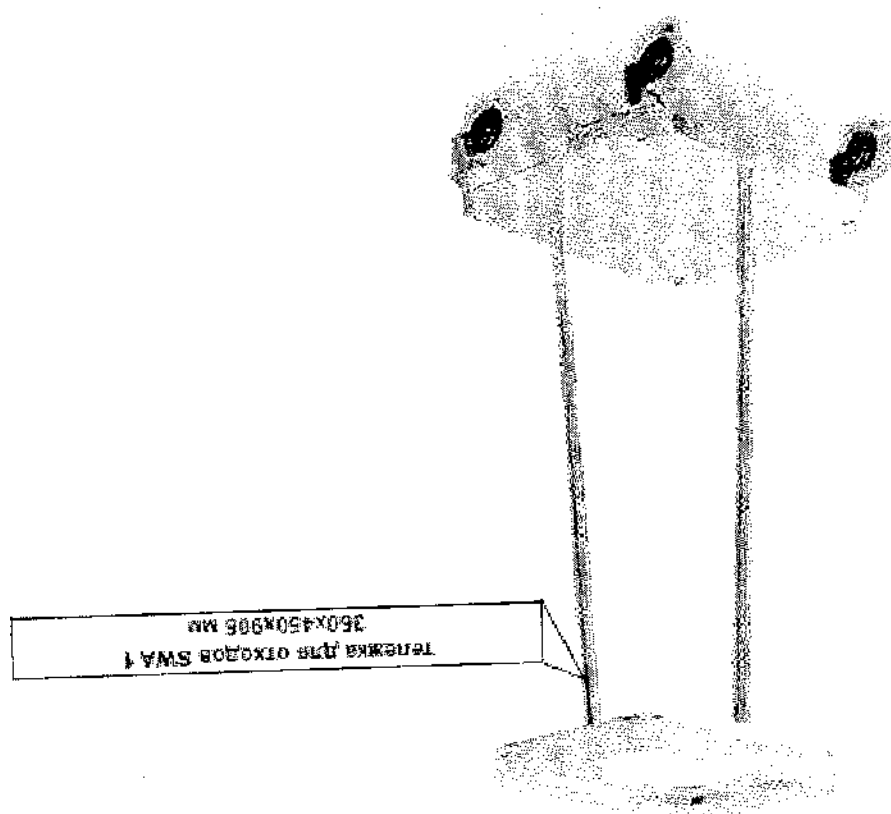


Изображение изделия с ядром


Изображение изделия с ярлыком

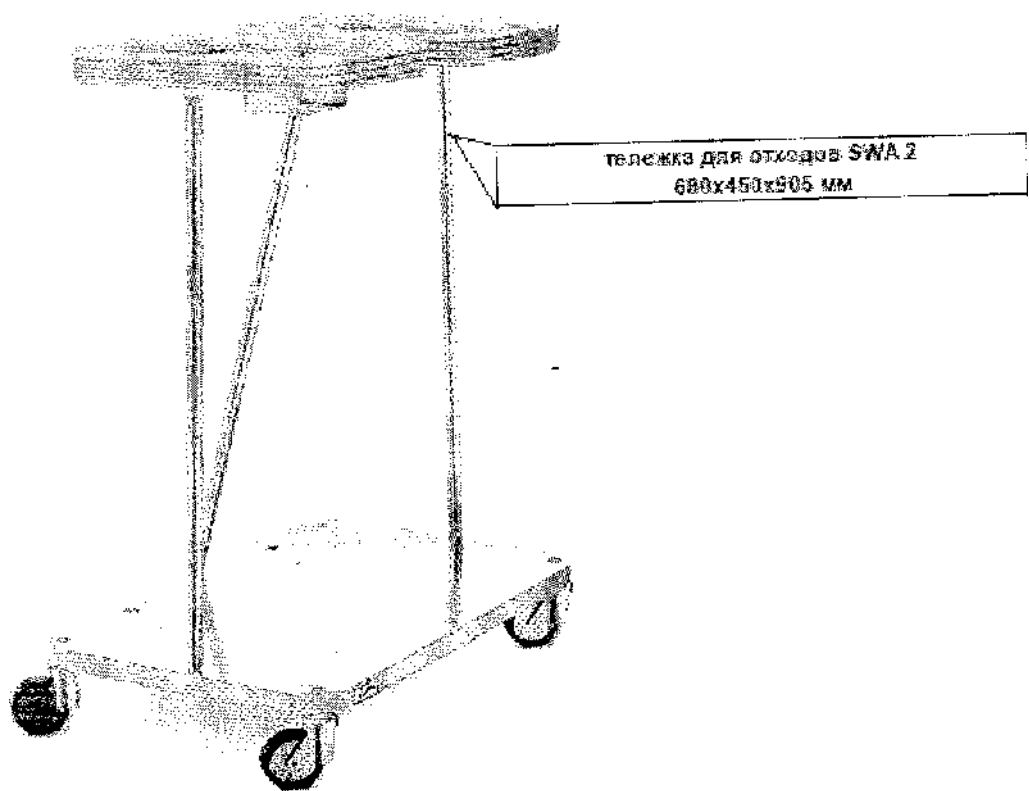


Изображение изделия с ярлыком

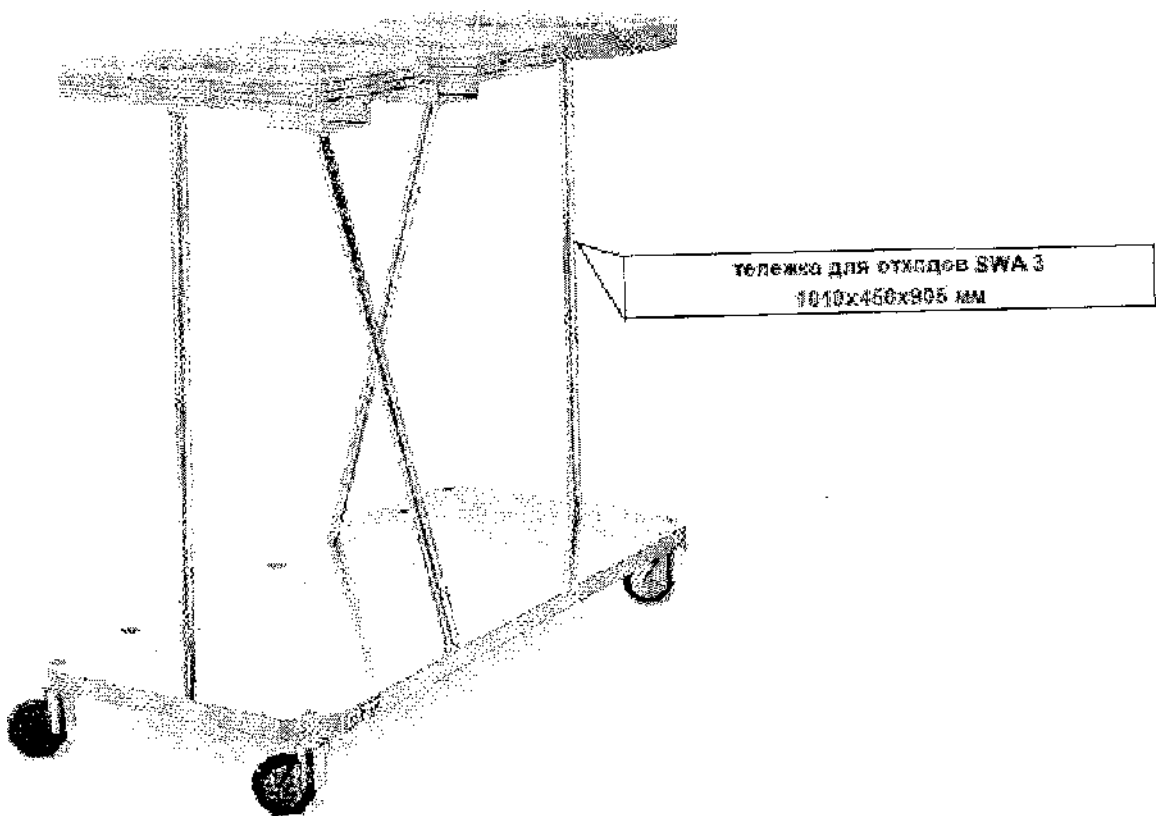


Изображение изделия с ярлыком

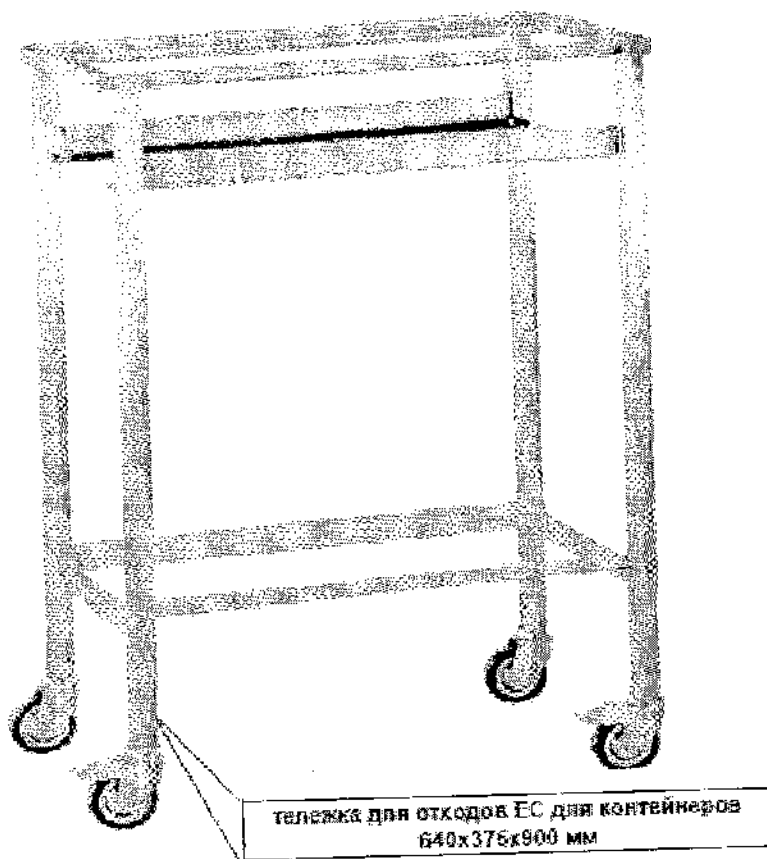


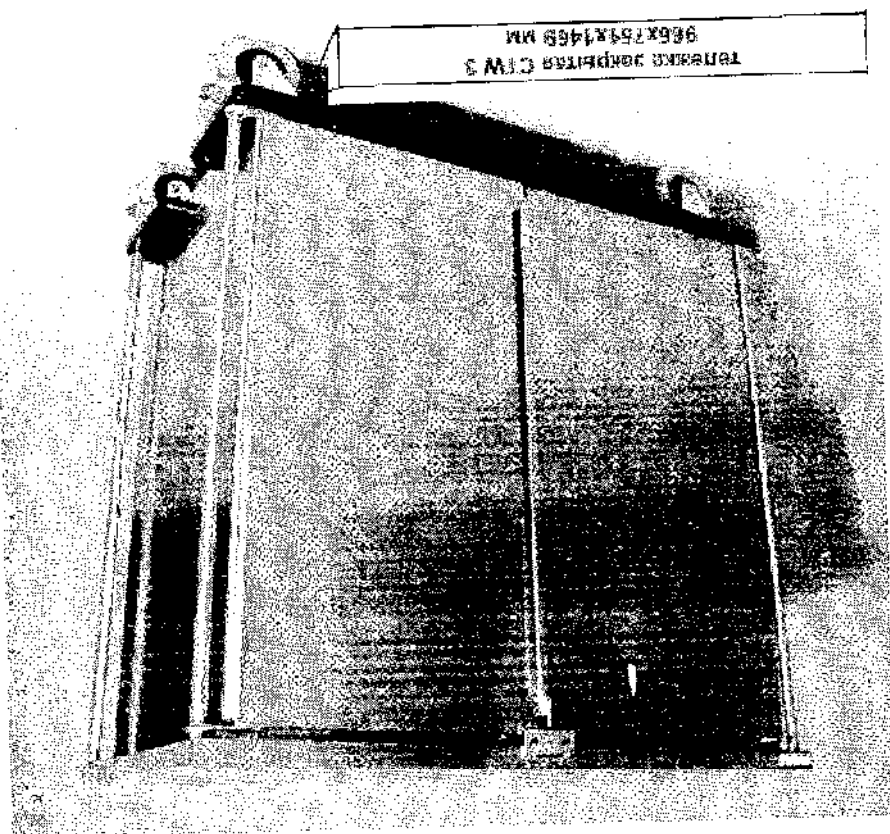

Изображение изделия с открытым

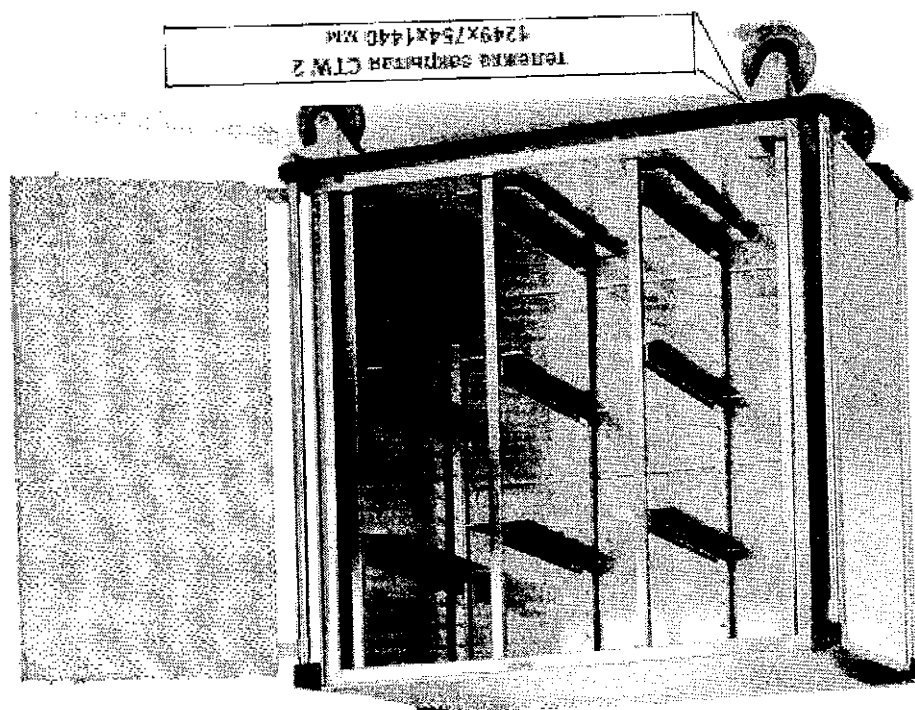


Изображение изделия с открытым

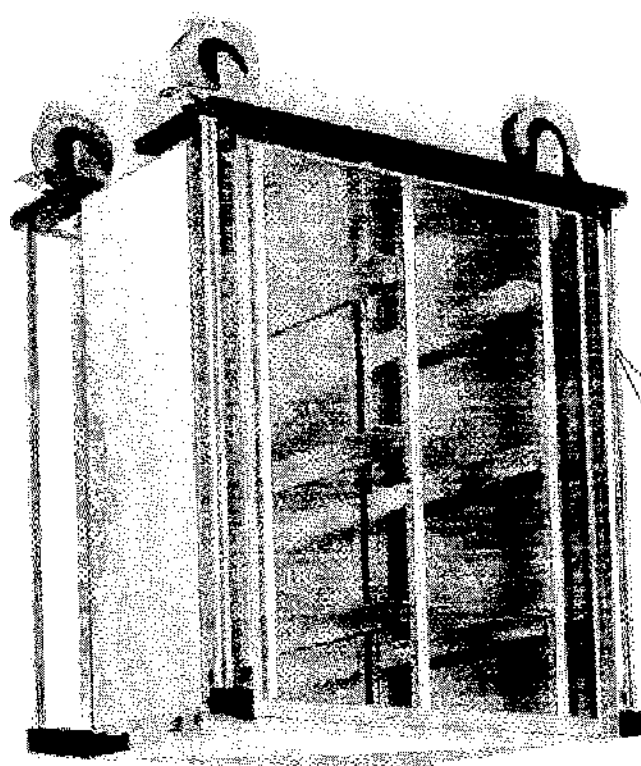


БЕЗОПАСНОСТЬ
985x764x1445 мм

Изображение изделия с прорисовкой


Изображение изделия с ярлыком

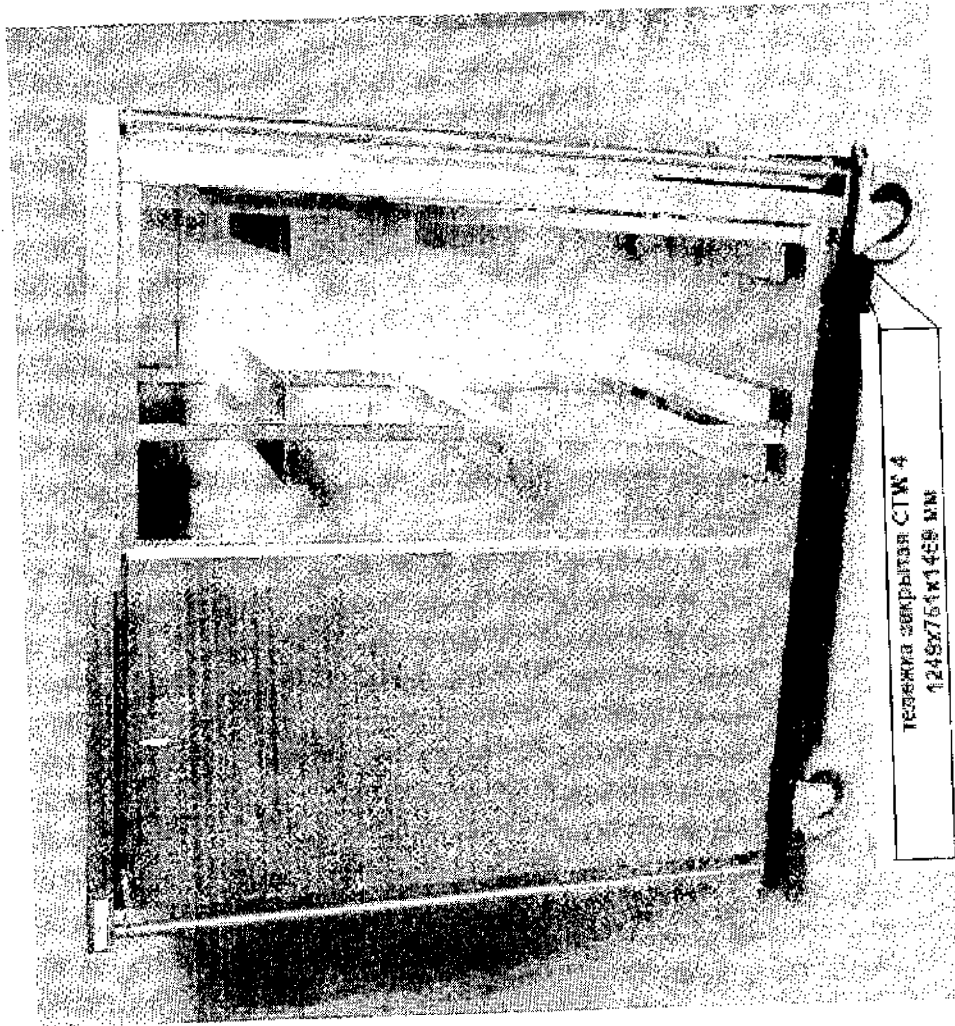

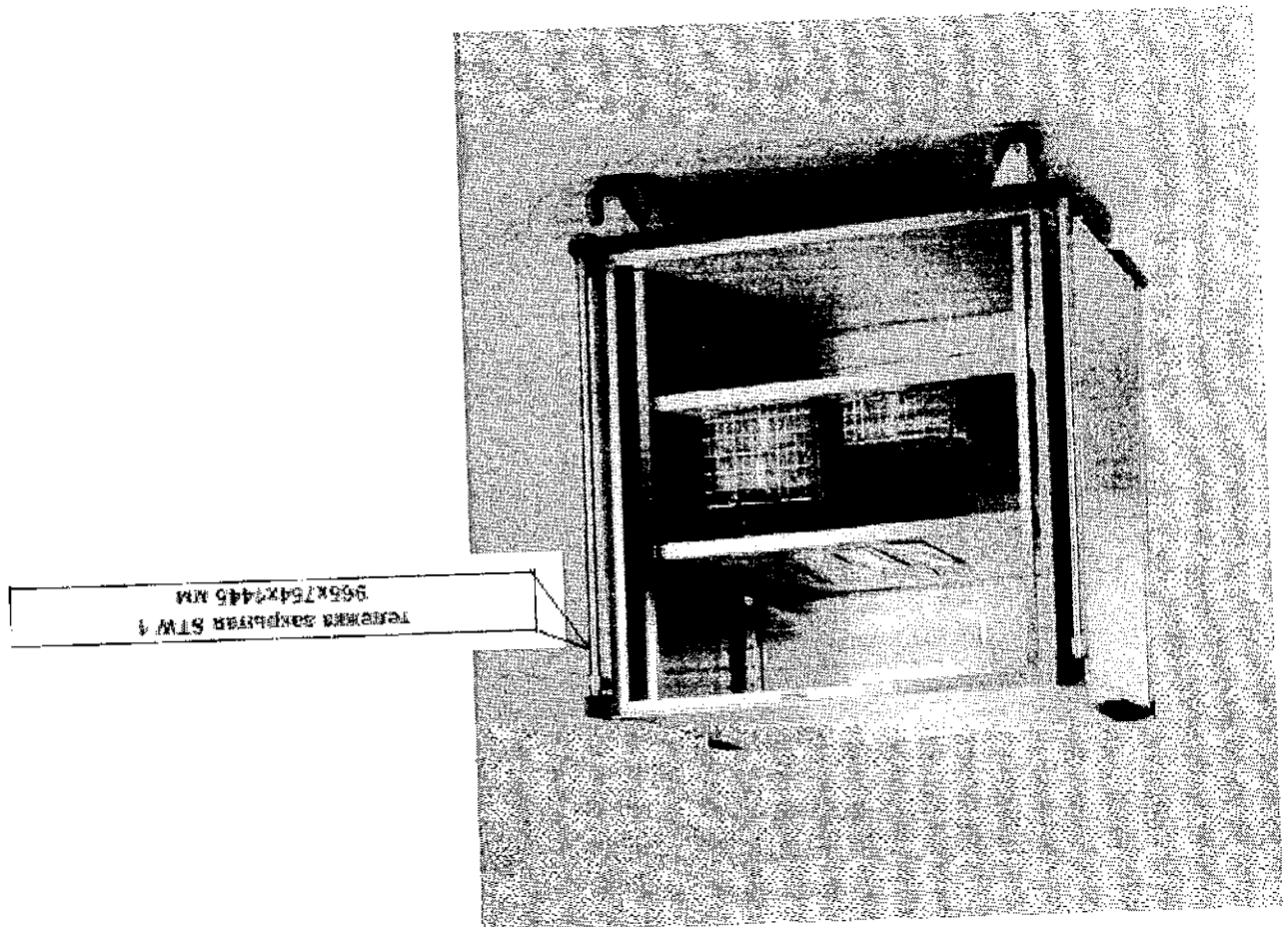


Изображение изделия с водяным


Изображение изделия с ярыжом

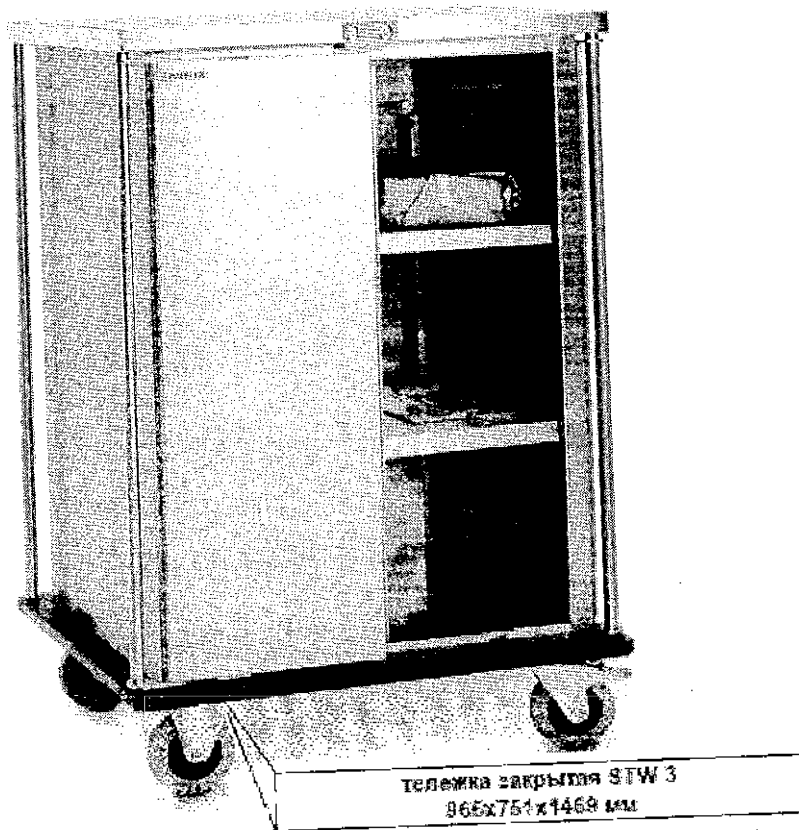


Изображение изделия с ярлыком

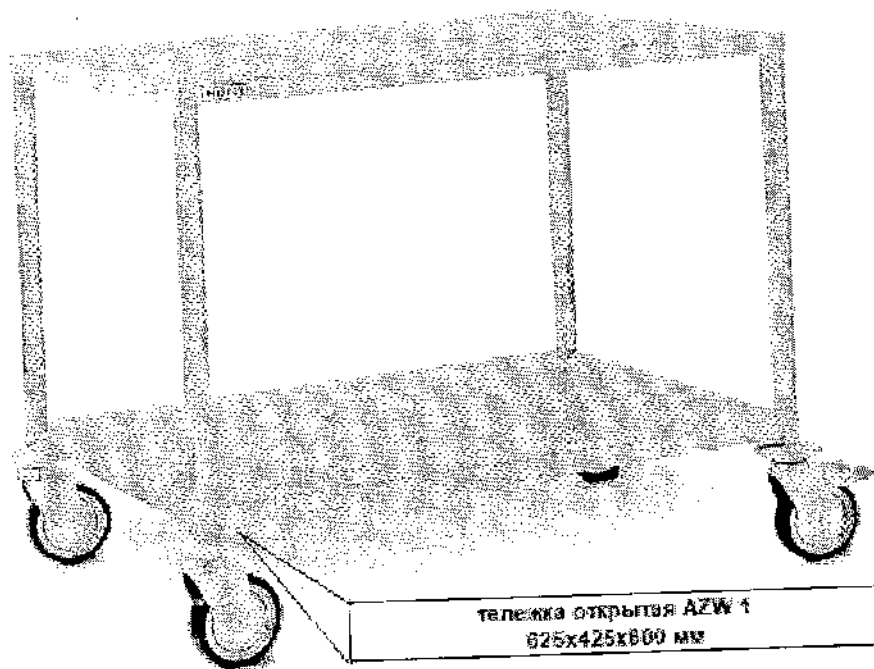

Изображение изделия с ярлыком

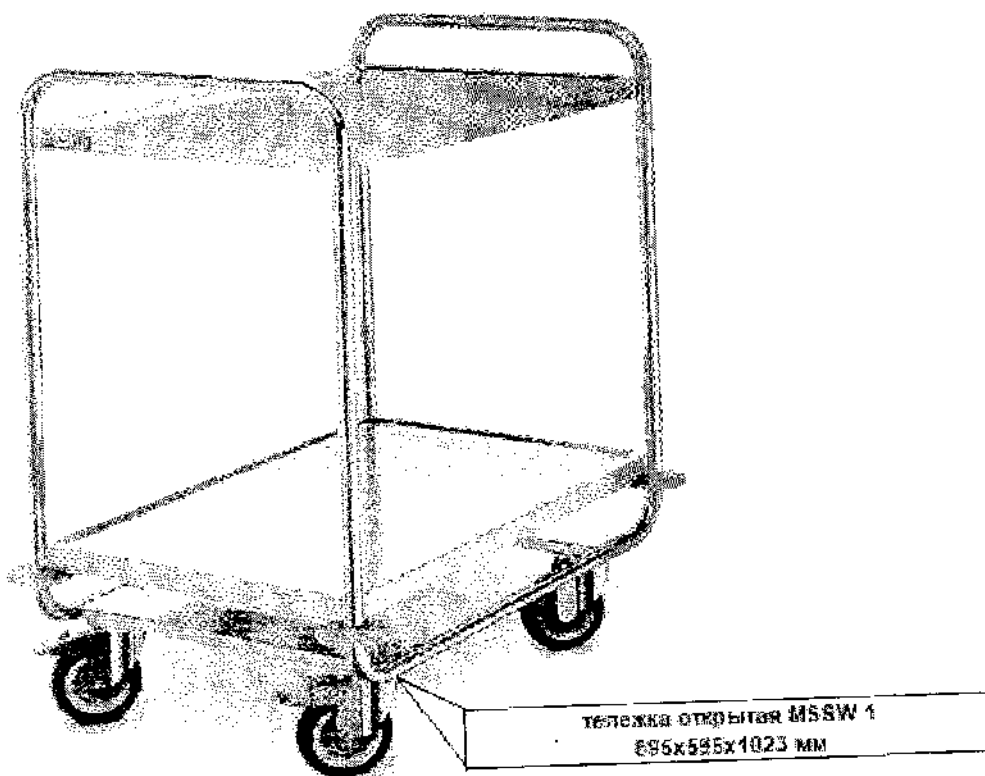


Изображение изделия с ярлыком

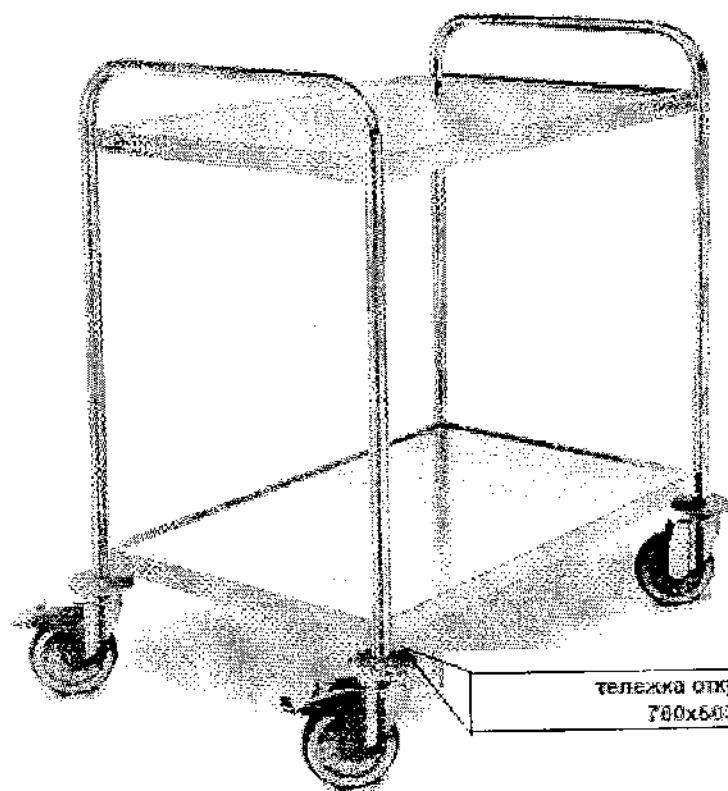


тележка открытая MSW 1
760x600x895 мм

Изображение изделия с арматурой

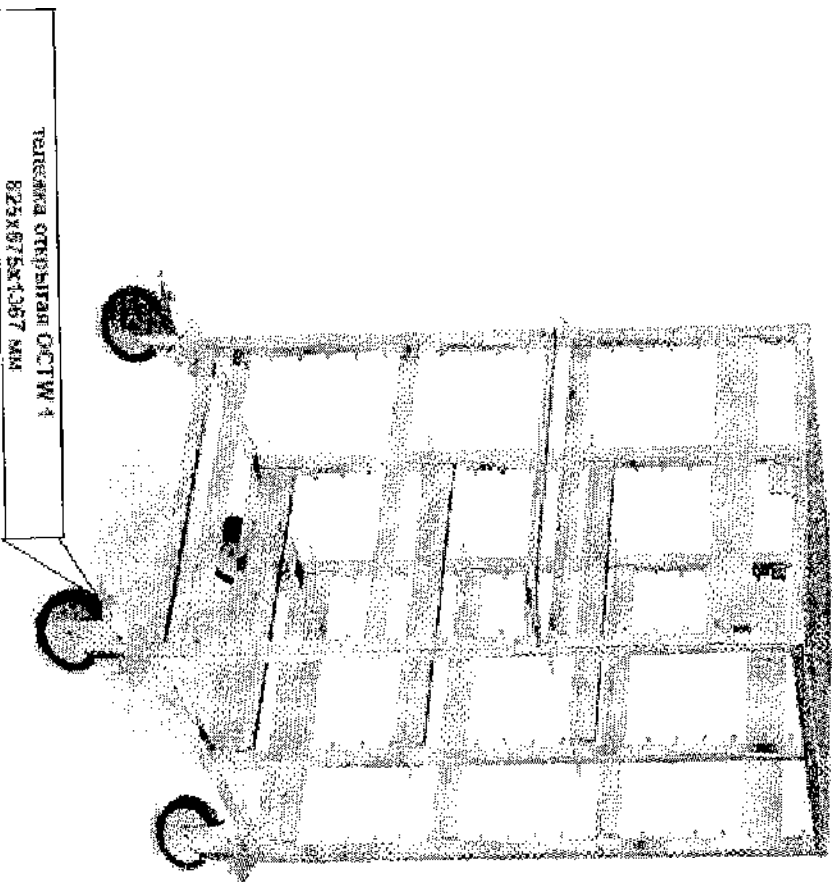


22217
31.03.2021

Изображение изделия с ярлыком

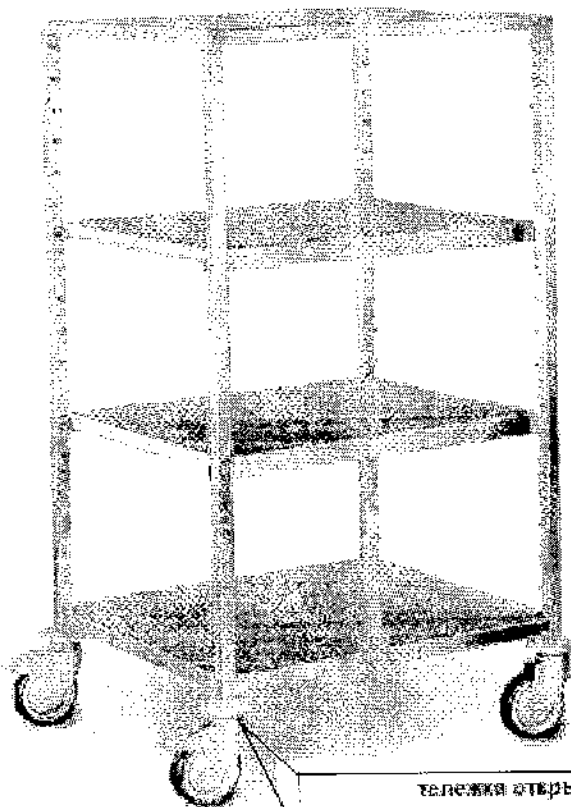


тележка откритая OSTW 1
826x675x1367 мм

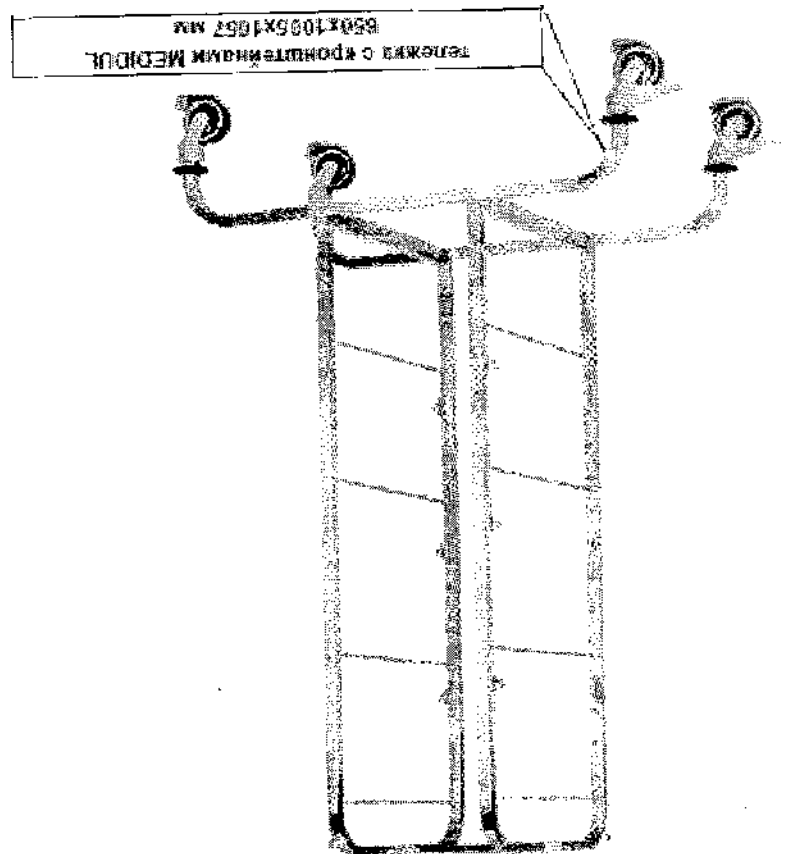


Изображение изделия с ярыком


22217
31.03.2021

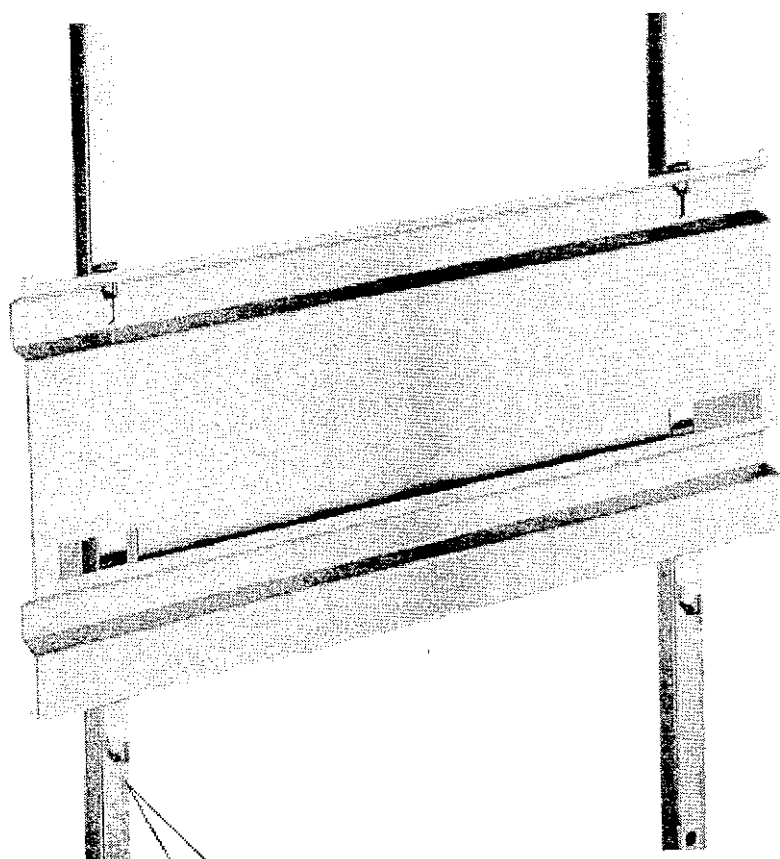


Универсальный держатель для всех
моделей столов и тележек
655x280x108 мм

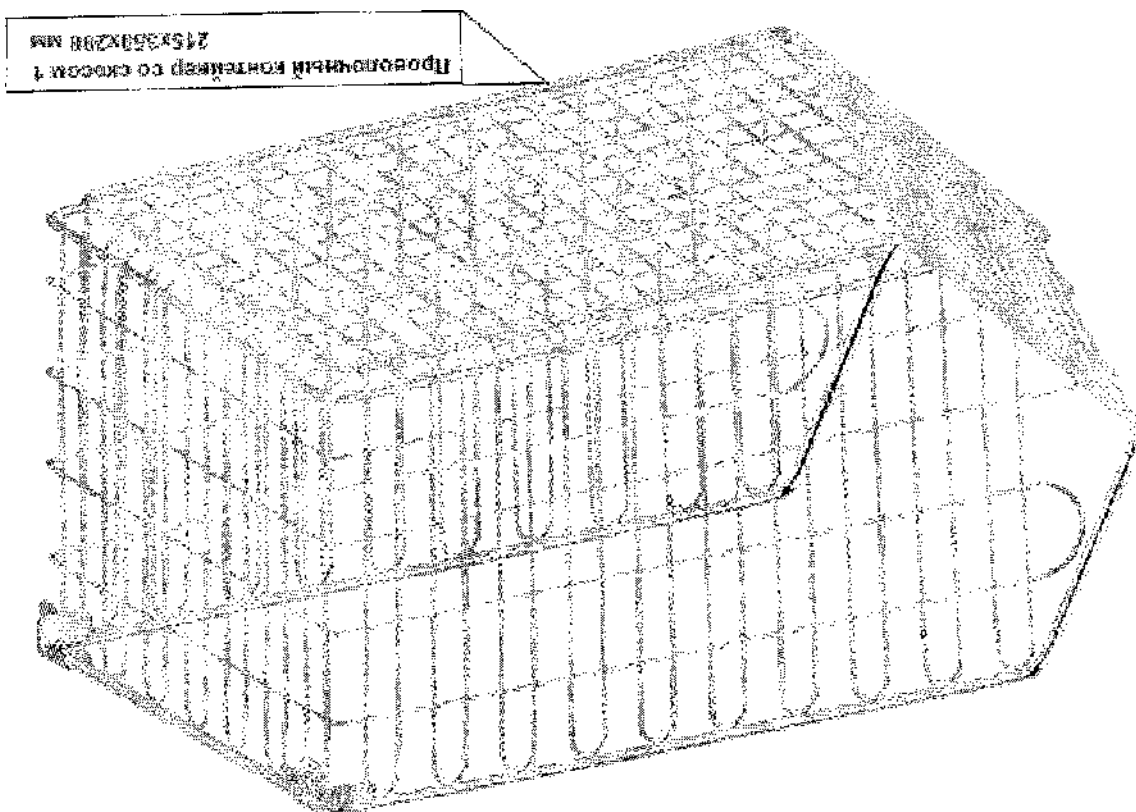

Изображение изделия с артикулом

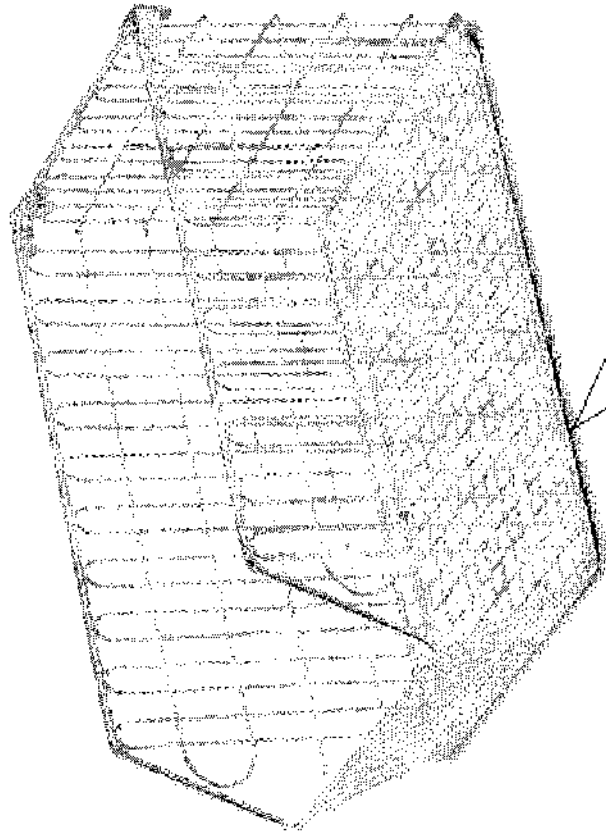


Проволочный контейнер со швом 2
153x231x125 мм

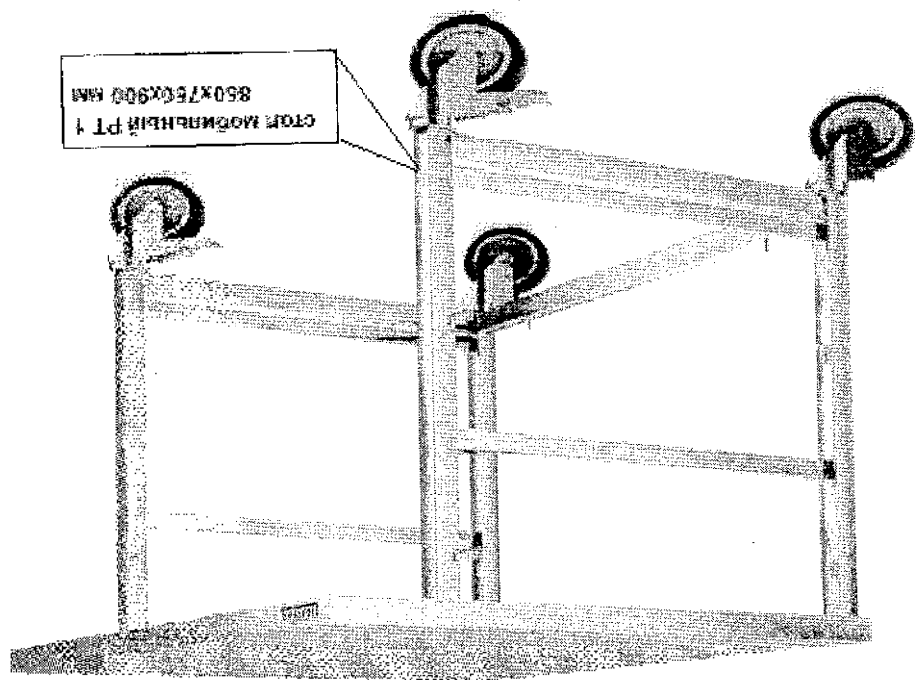


Изображение является собственностью

Изображение изделия с ярлыком

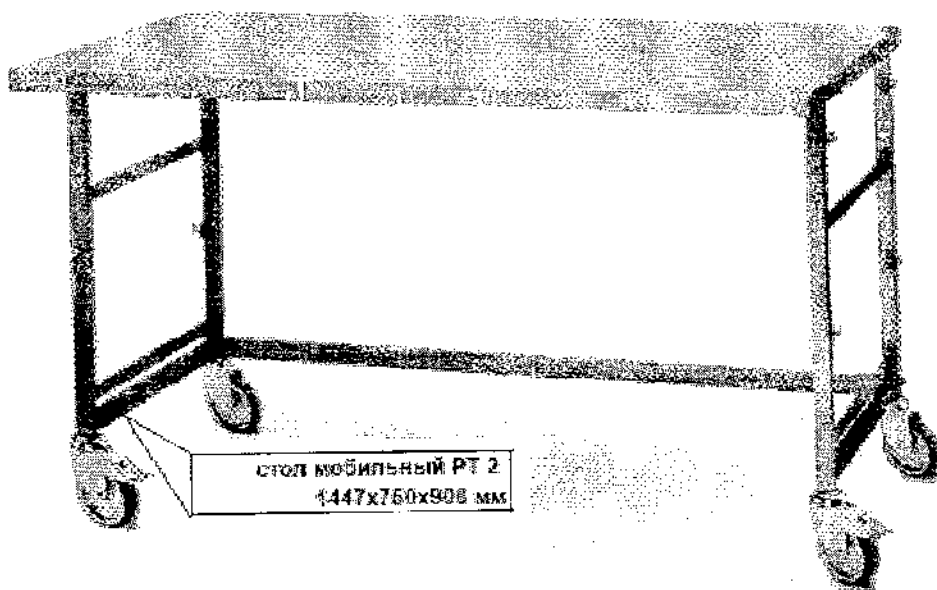


Модернизация изделия с ярымком

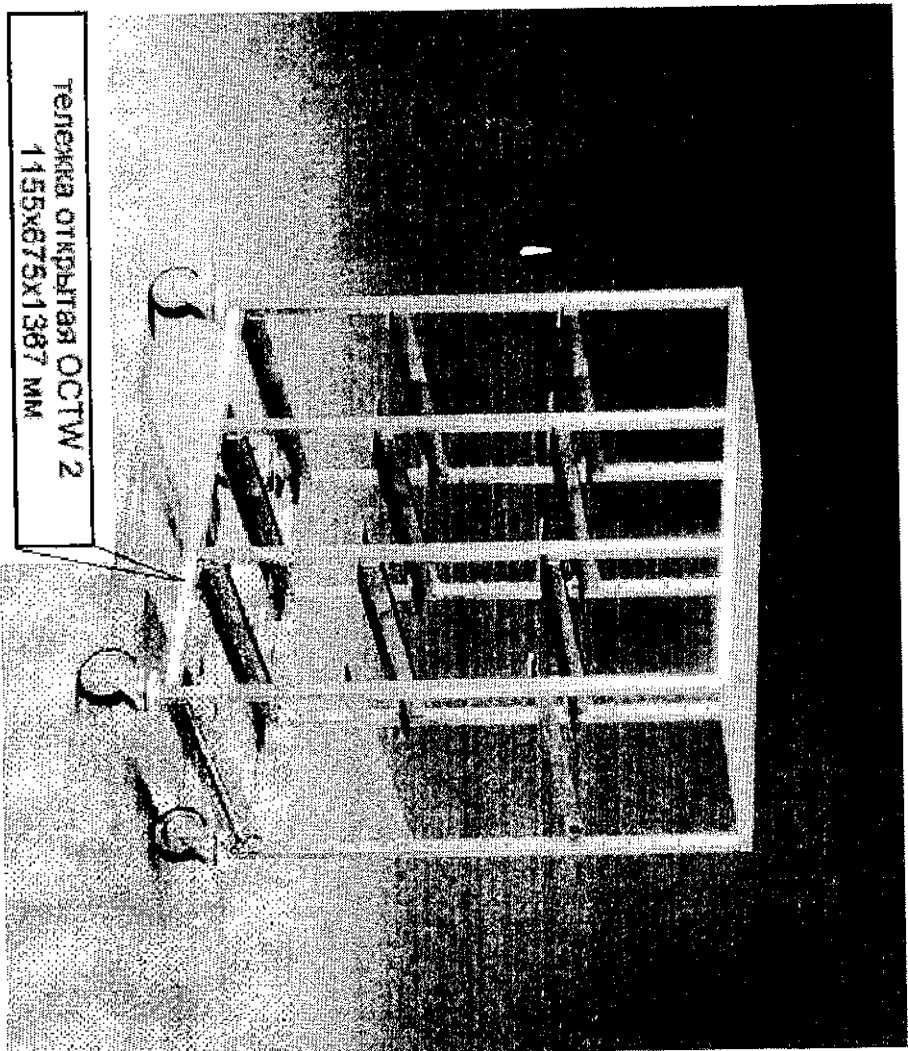


Тележка открытая ОСТН 2
115х675х1367 мм

22217
31.03.2021

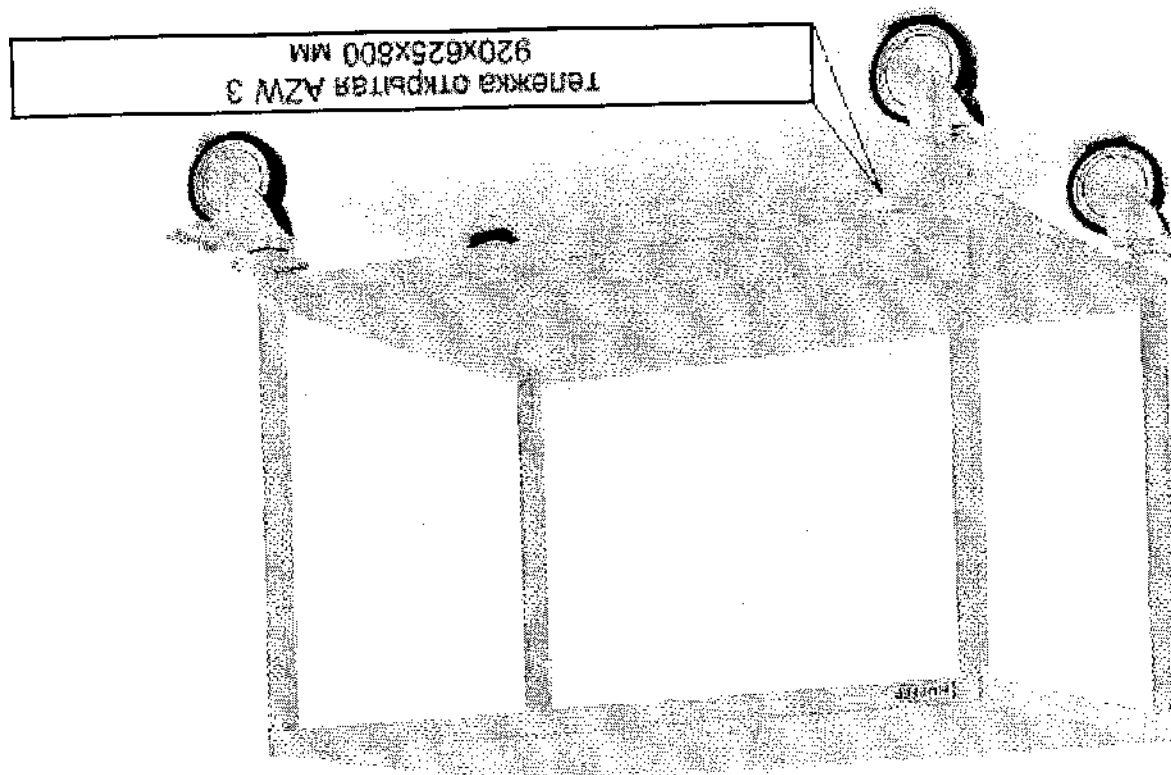


Изображение изделия с ящиком

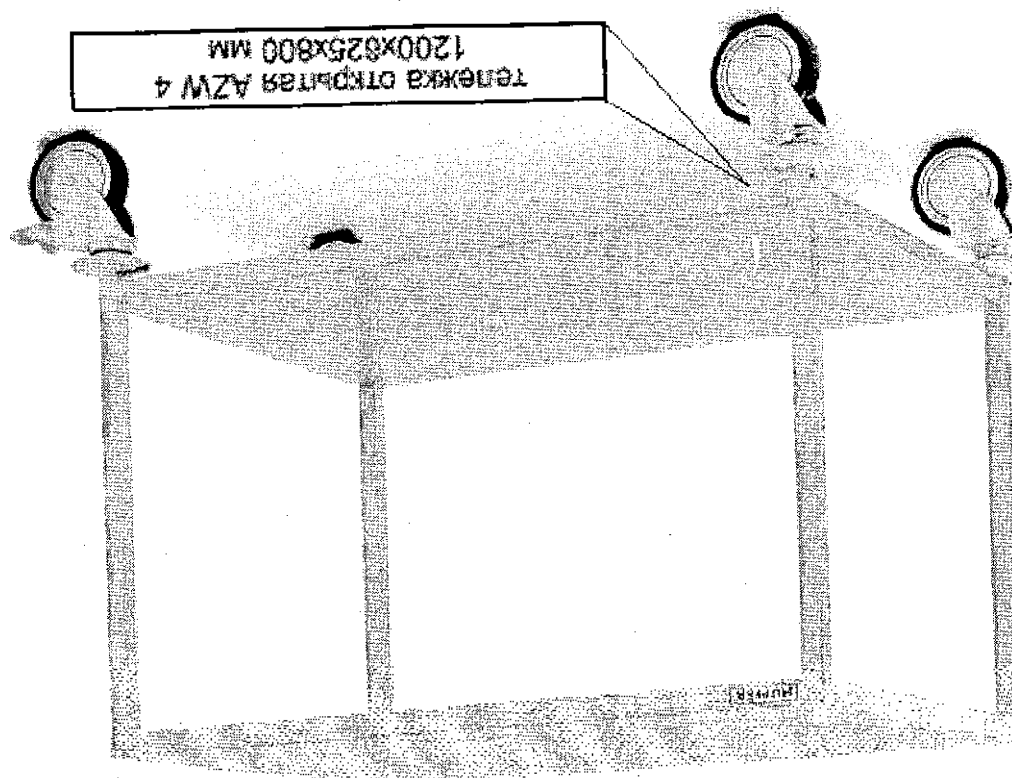


Изображение изделия с ящиком

Изображение изделия с ярлыком

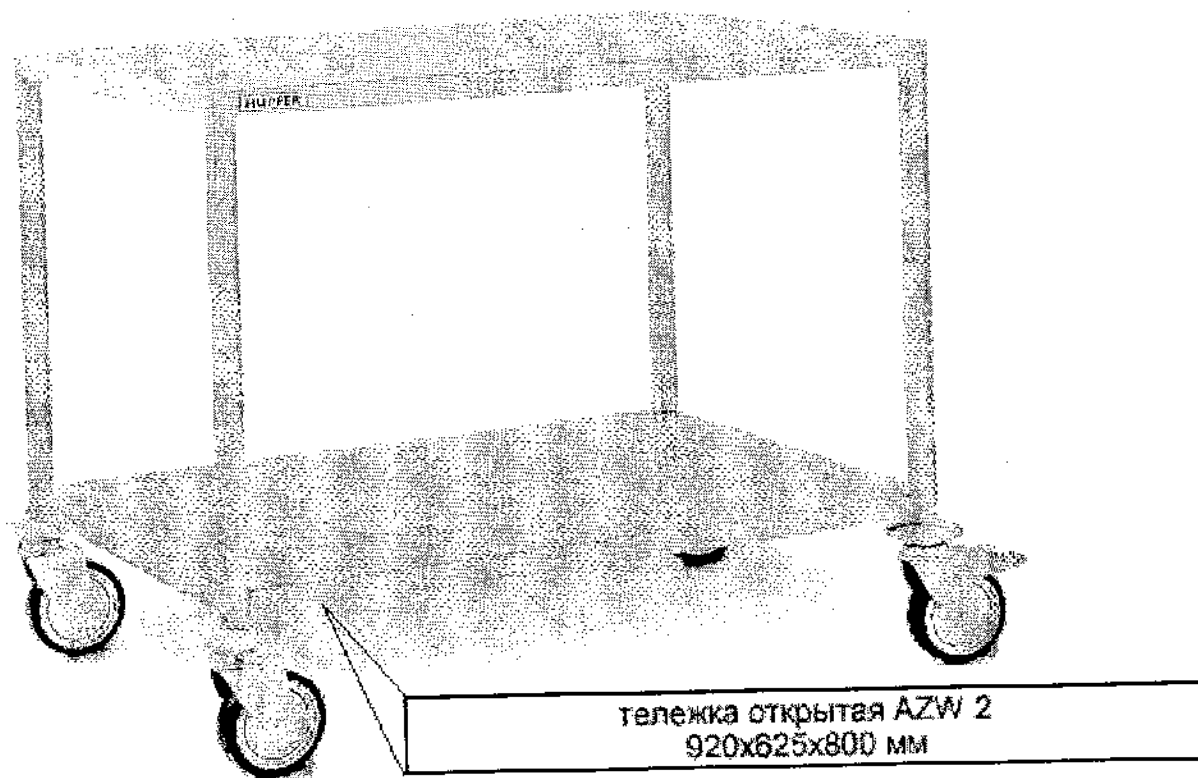



Изображение изделия с ярлыком

тележка открытая MSSW 2
1095x695x1023 мм

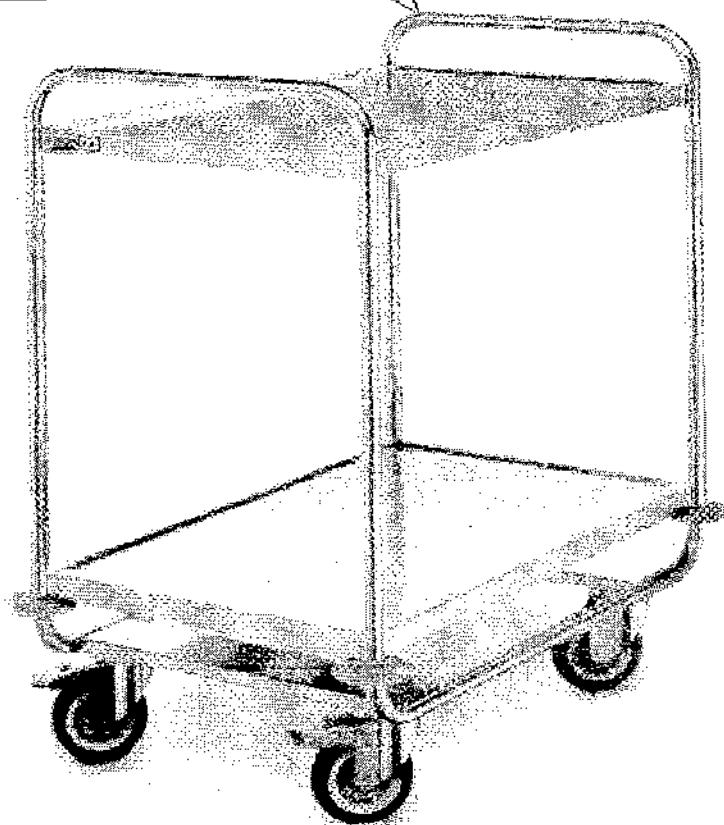


тележка открытая MSW 3
1095x695x960 мм

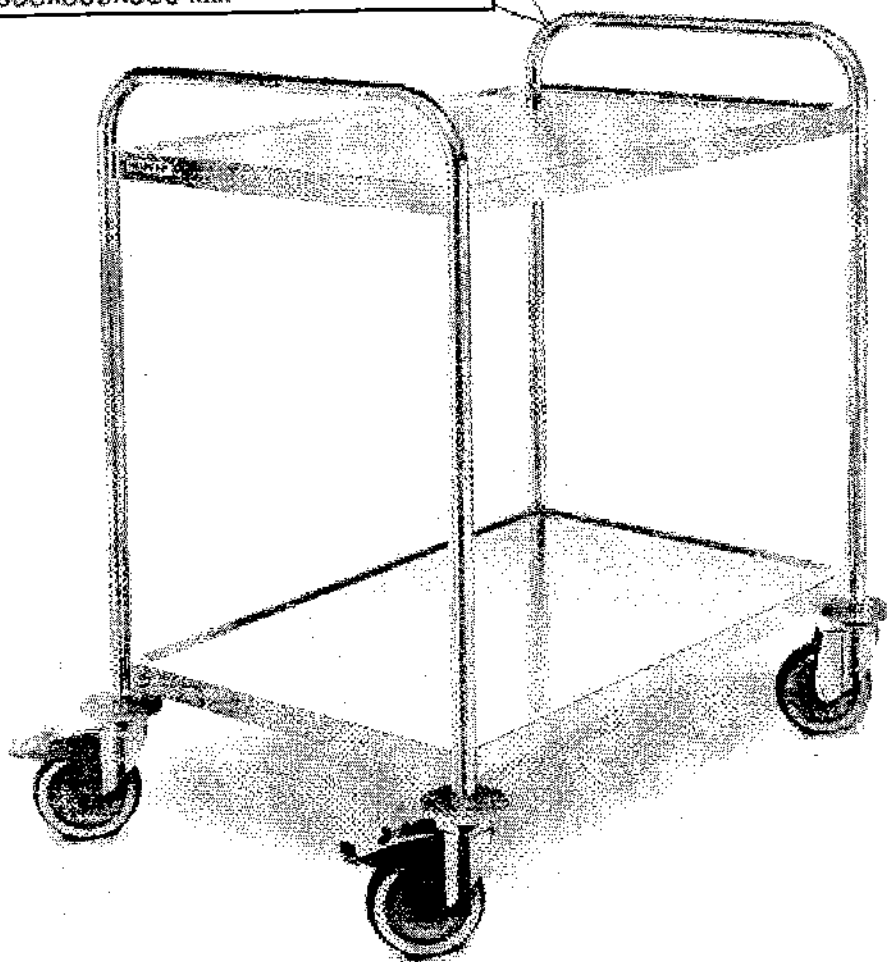

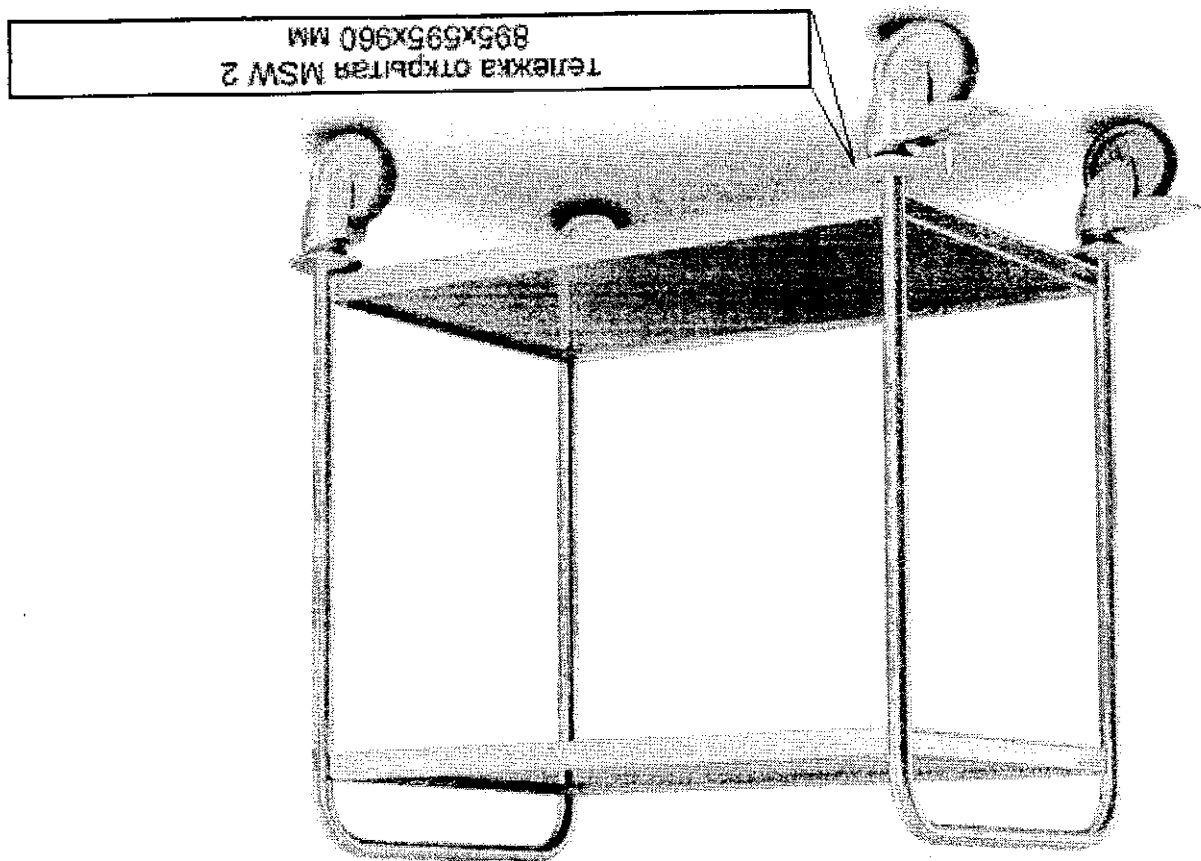


Изображение изделия с ярлыком


тележка с кронштейнами 4
605x675x1097 мм

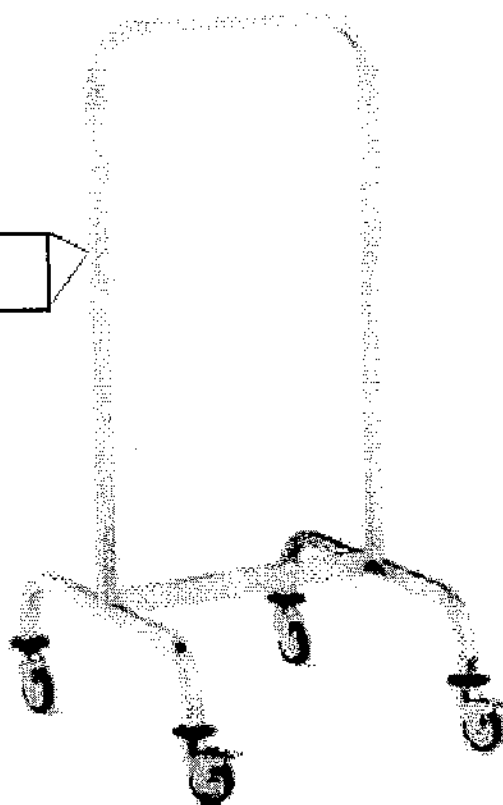


Изображение изделия с ярлыком

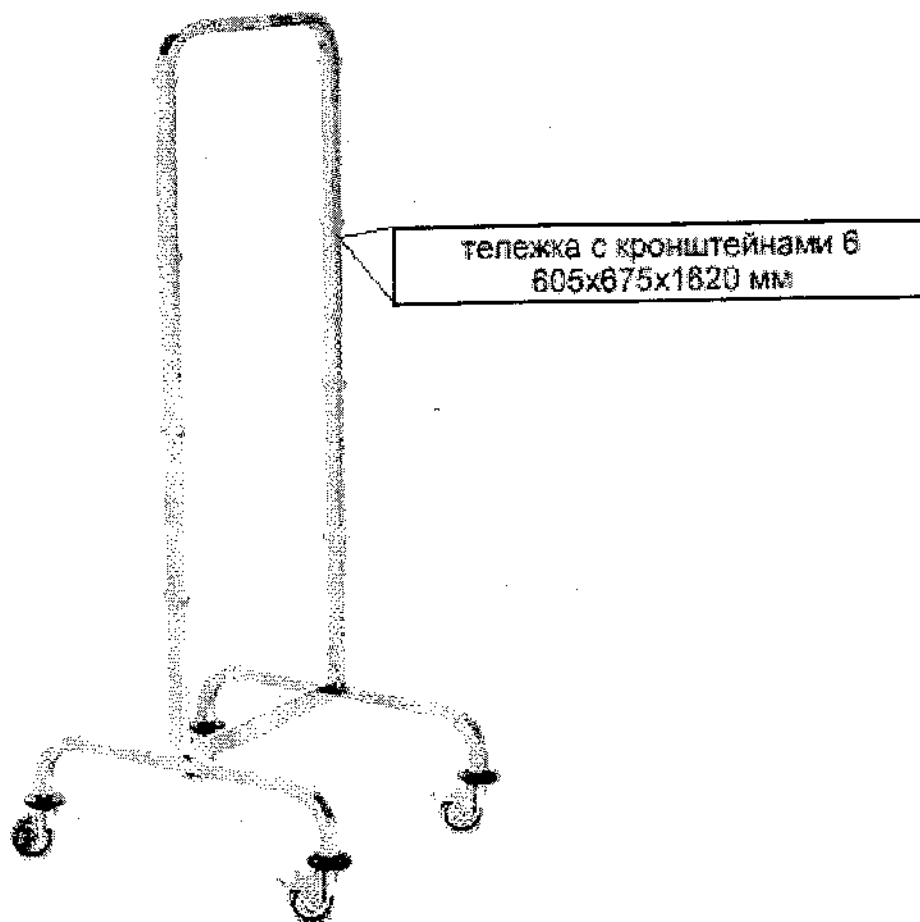


Изображение изделия с ярлыком

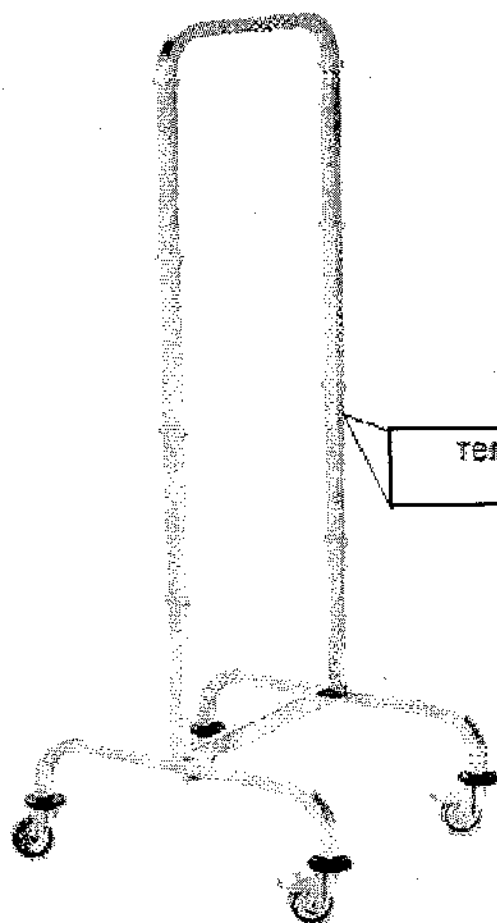


тележка с кронштейнами 3
605x465x1620 мм

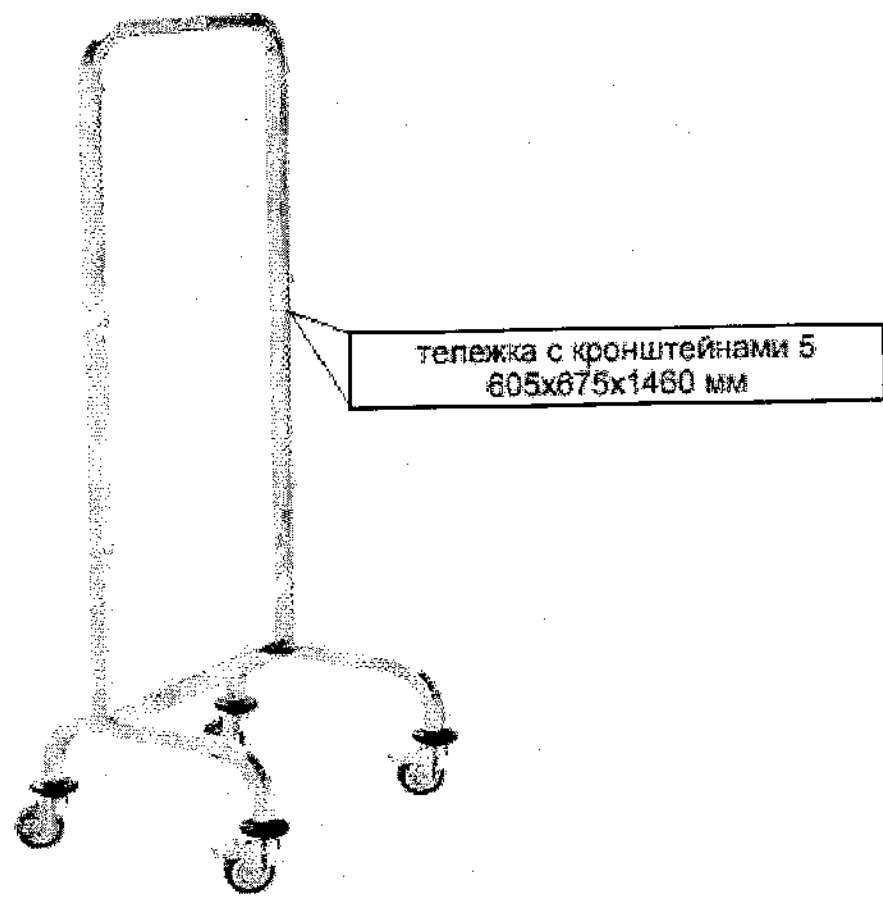

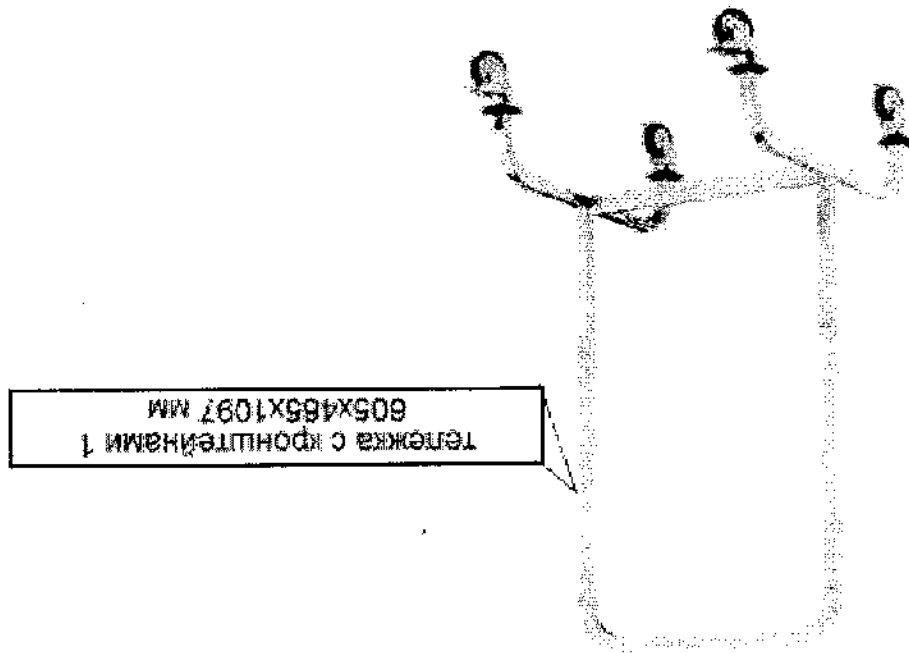


Изображение изделия с ярыком

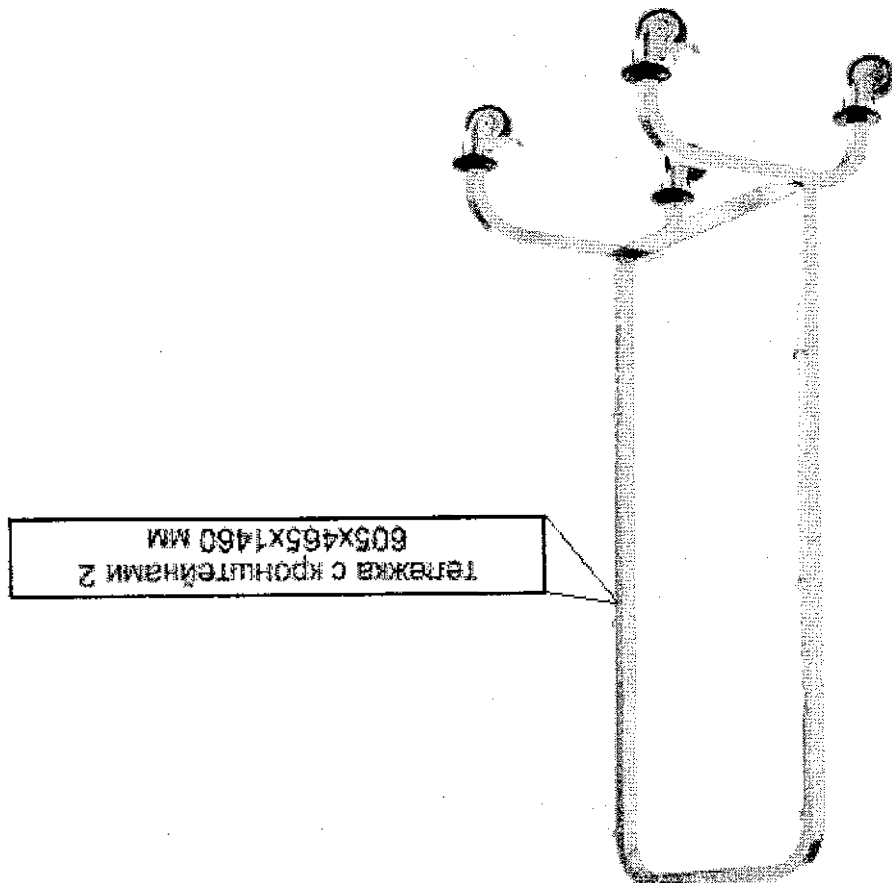


Изображение изделия с ярыком

22217
31.03.2021

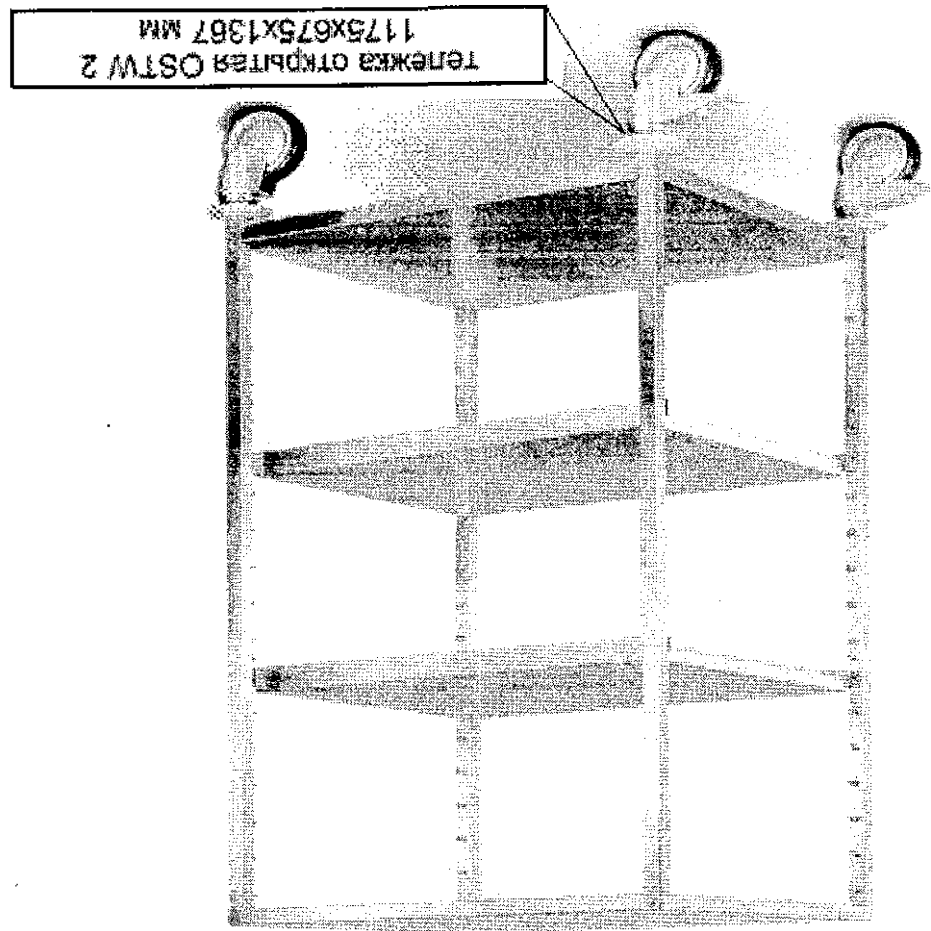


Изображение изделия с вариантами

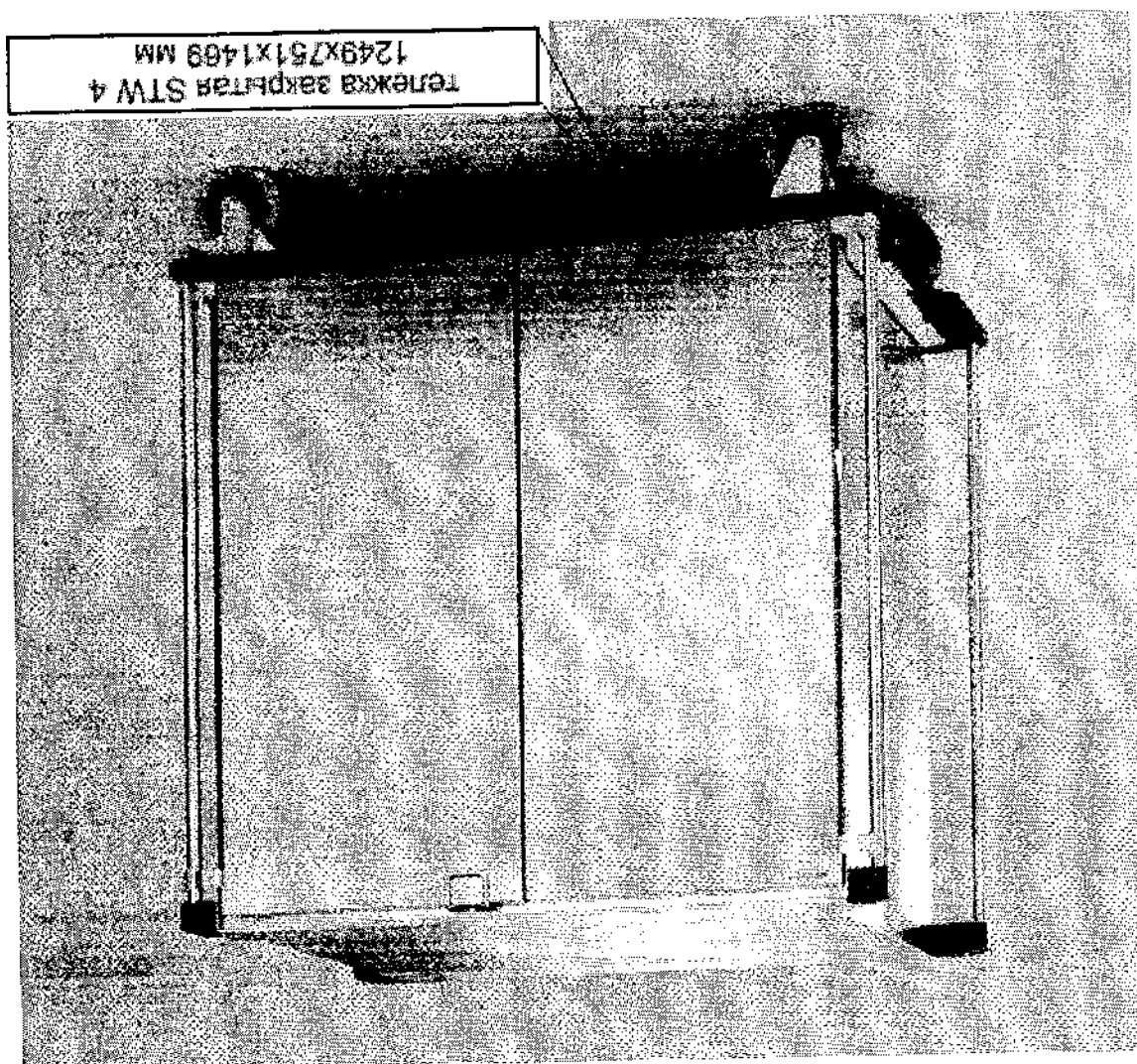

Изображение изделия с проемом




тележка закрытая STW 2
1249x754x1440 мм

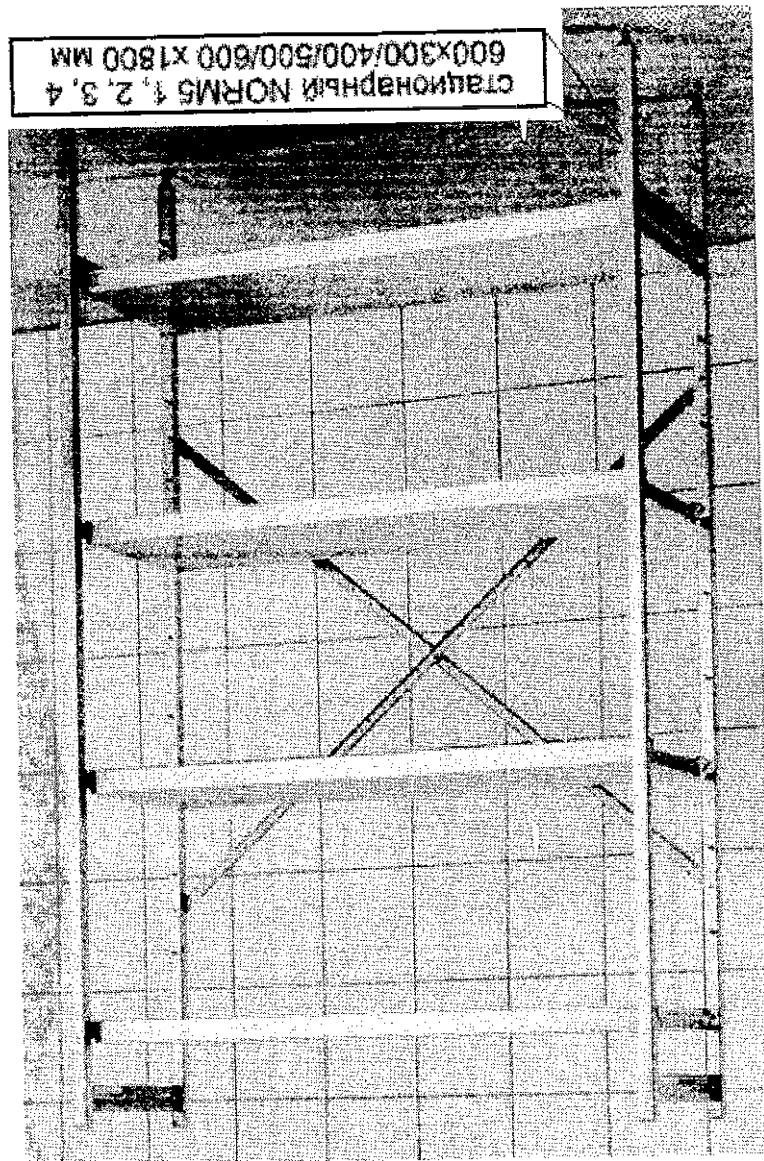


Исследование изделия с образцом

22217
31.03.2021

Изображение изделия с ярлыком

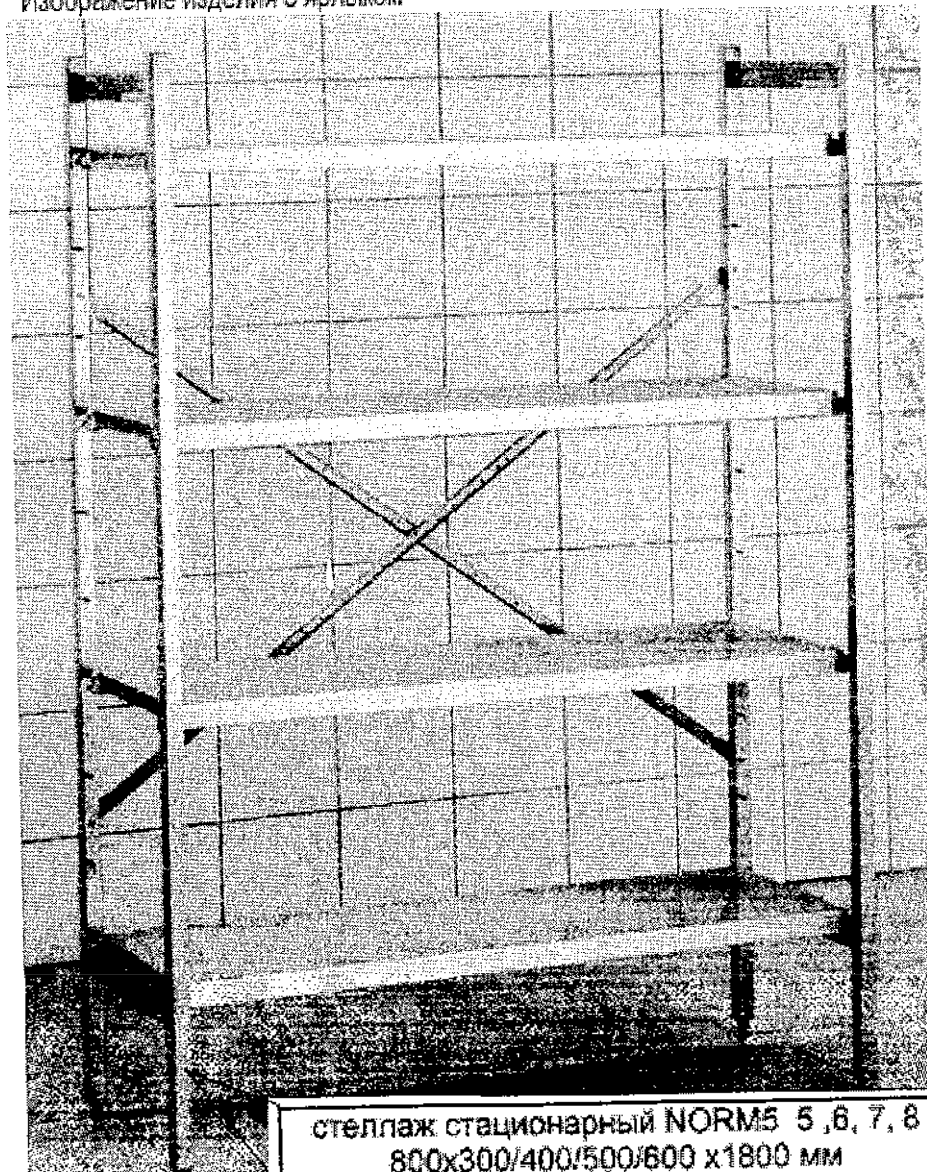


стеллаж стационарный NORM 5 9, 10, 11, 12
900x300/400/500/600 x1800 мм

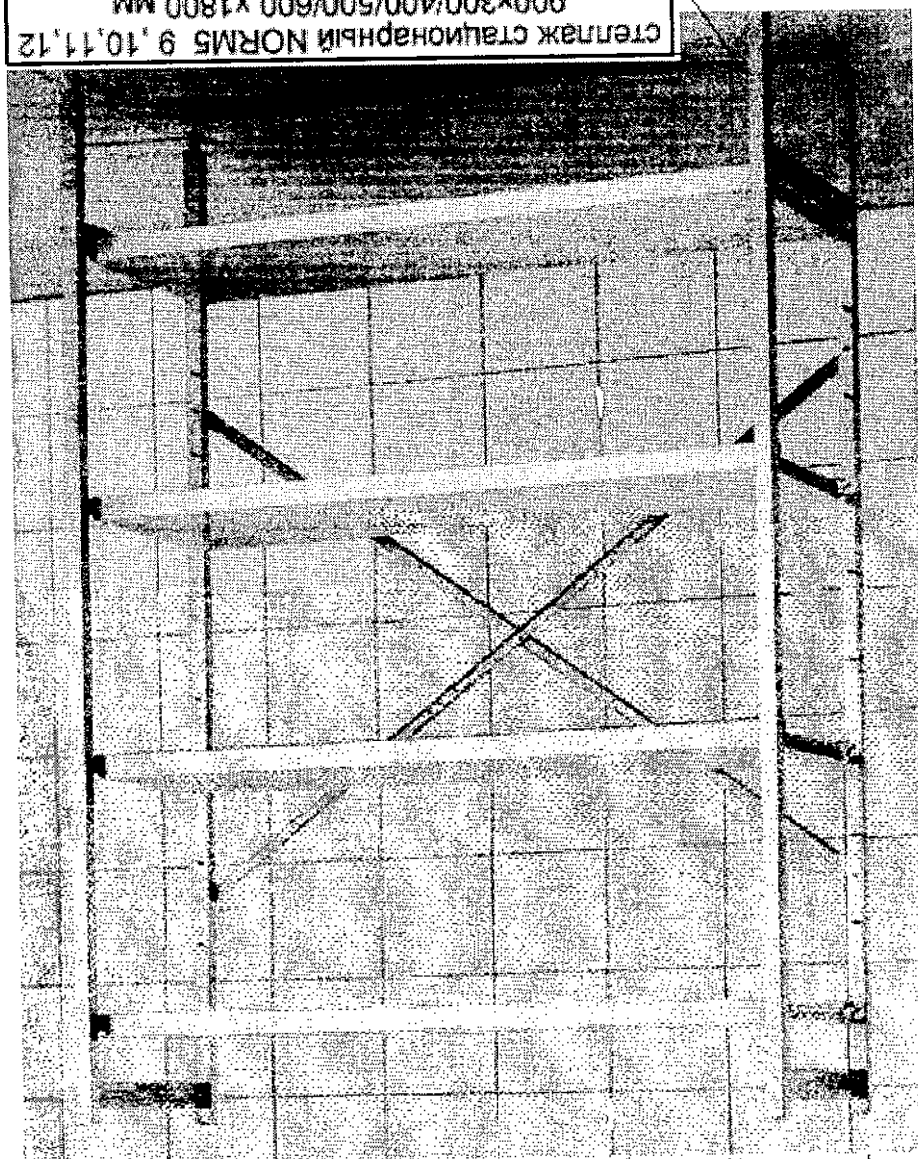

Изображение изделия с ярлыком

Изображение изделия с ярлыком

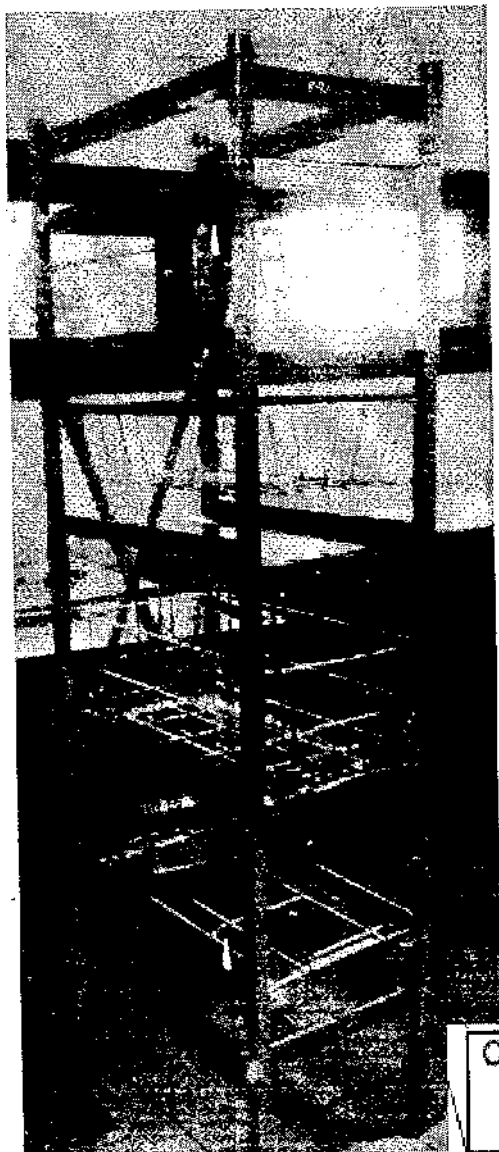



Стеллаж стационарный NORM5 MEDIDUL
3, 4
355/455 x 600 x 2000 мм

Изображение изделия с ярлыком


Стеллаж стационарный NORMS MEDIDUL
1,2
355/455 x 600 x 1800 мм

355/455

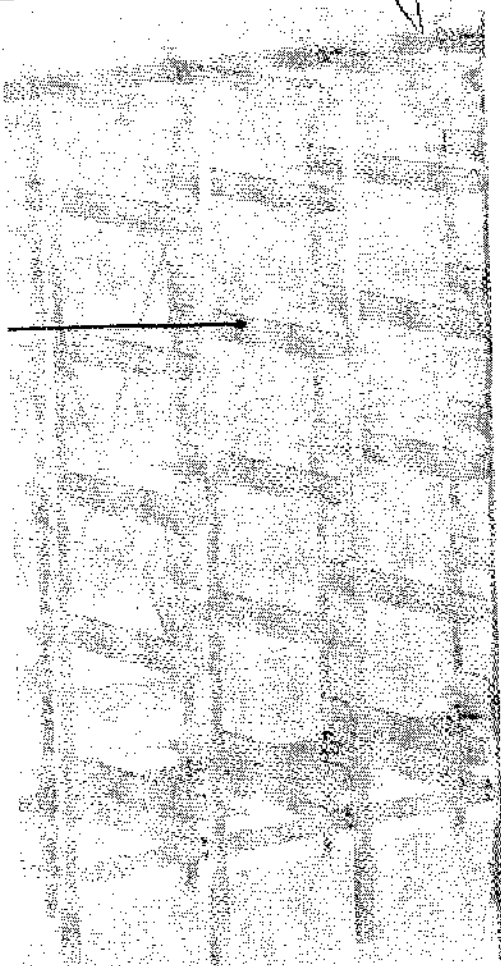


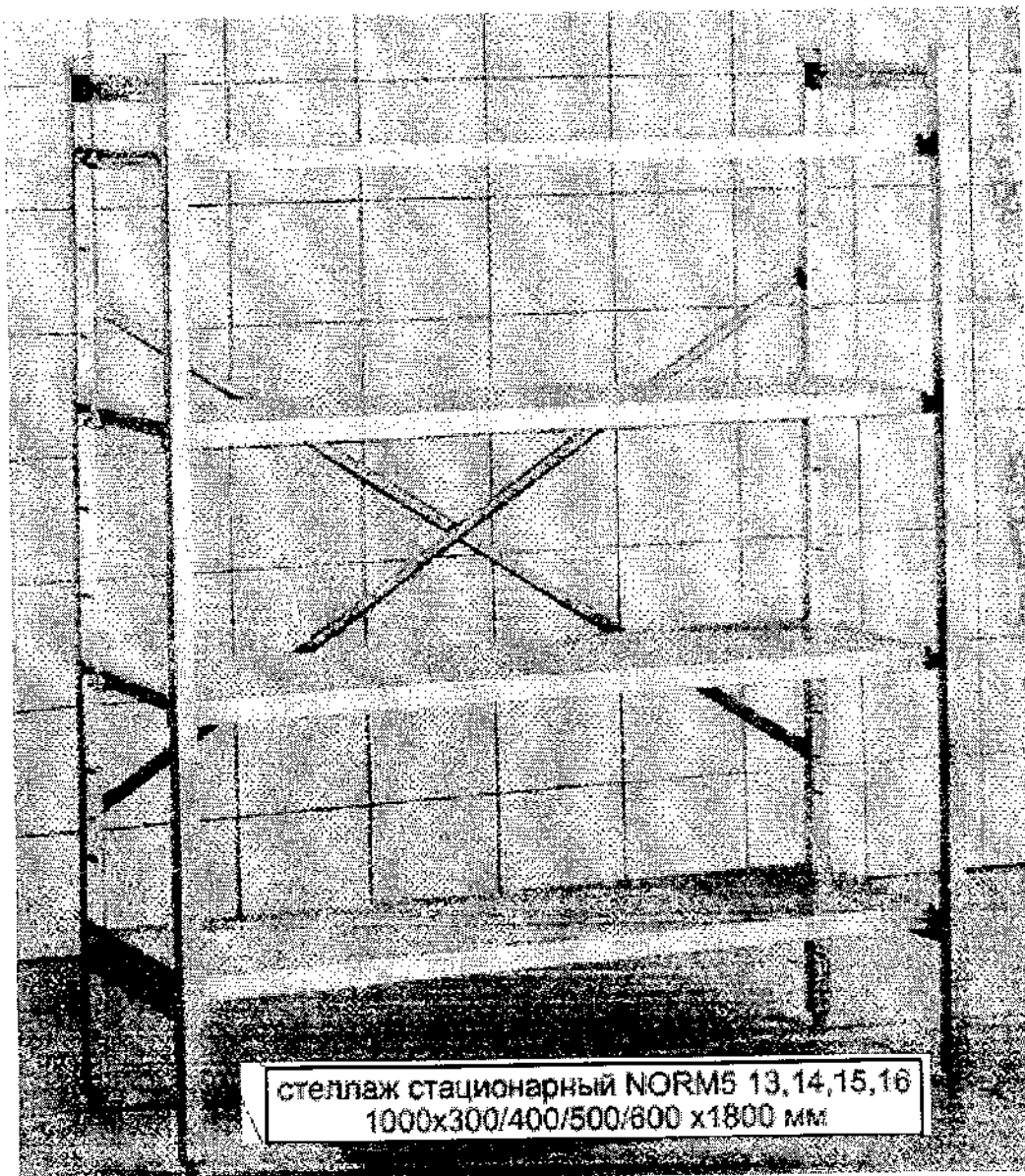


Изображение изделия с ярлыком

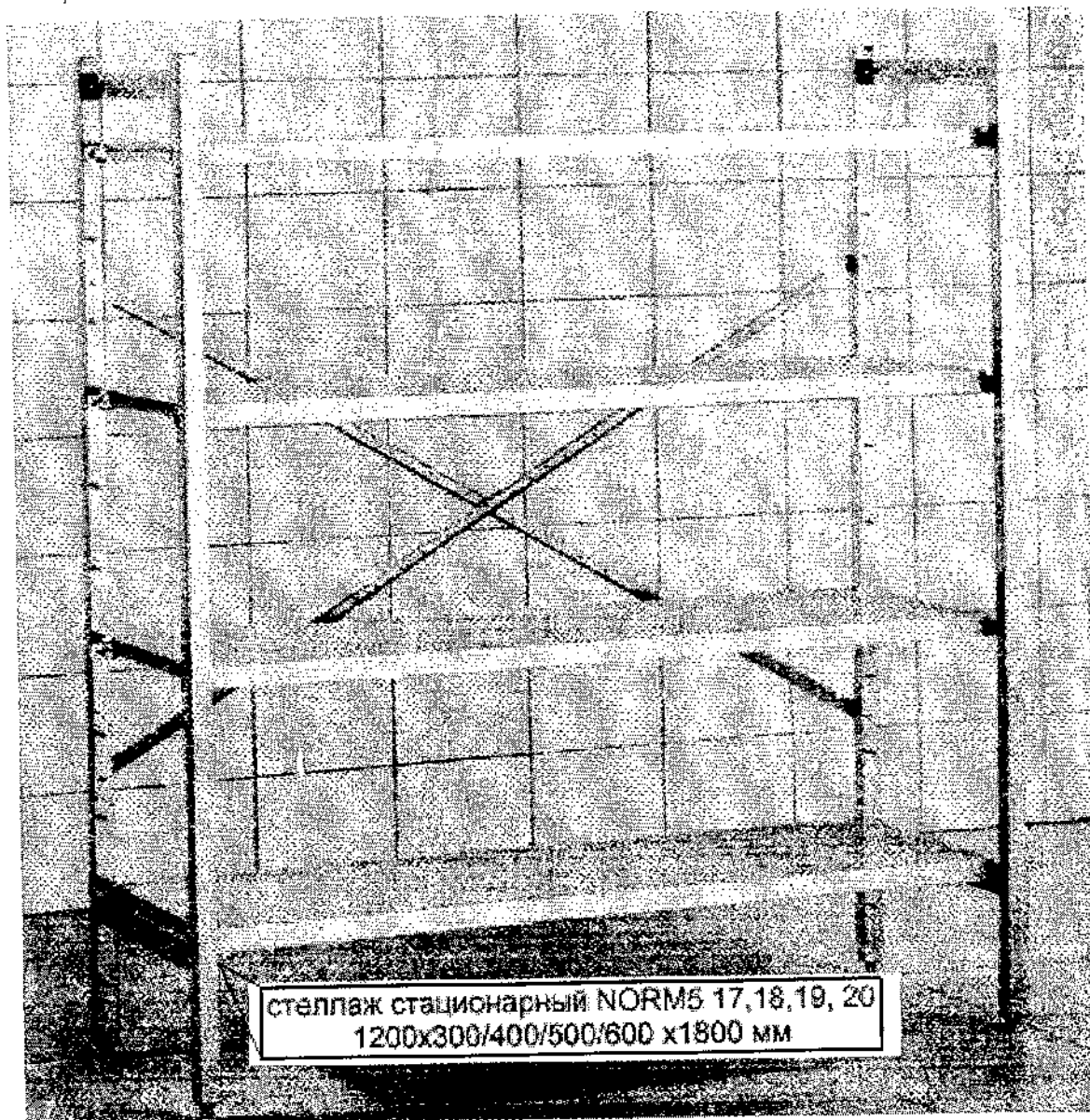

Изображение изделия с ярлыком

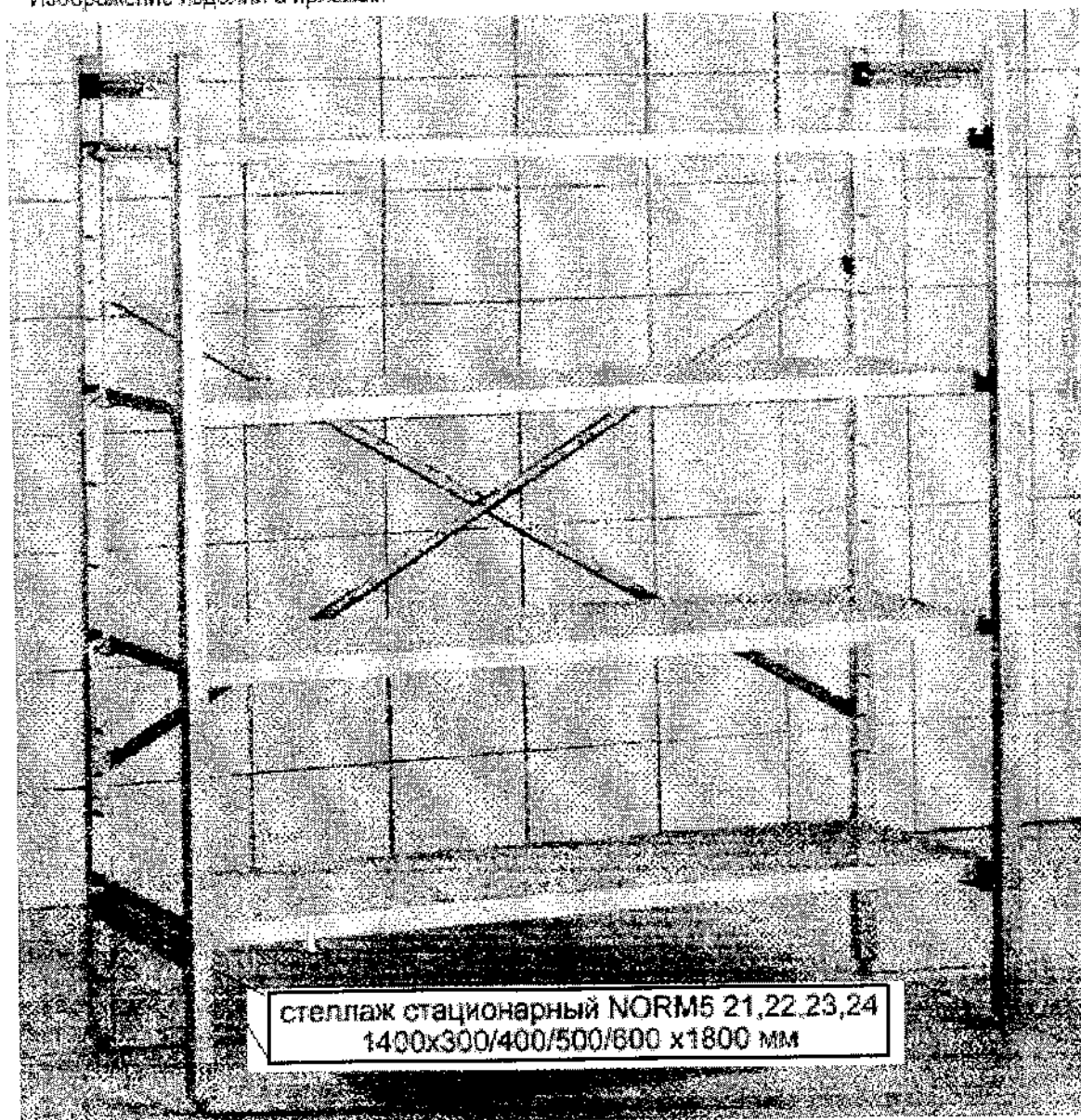

Изображение изделия с ярлыком

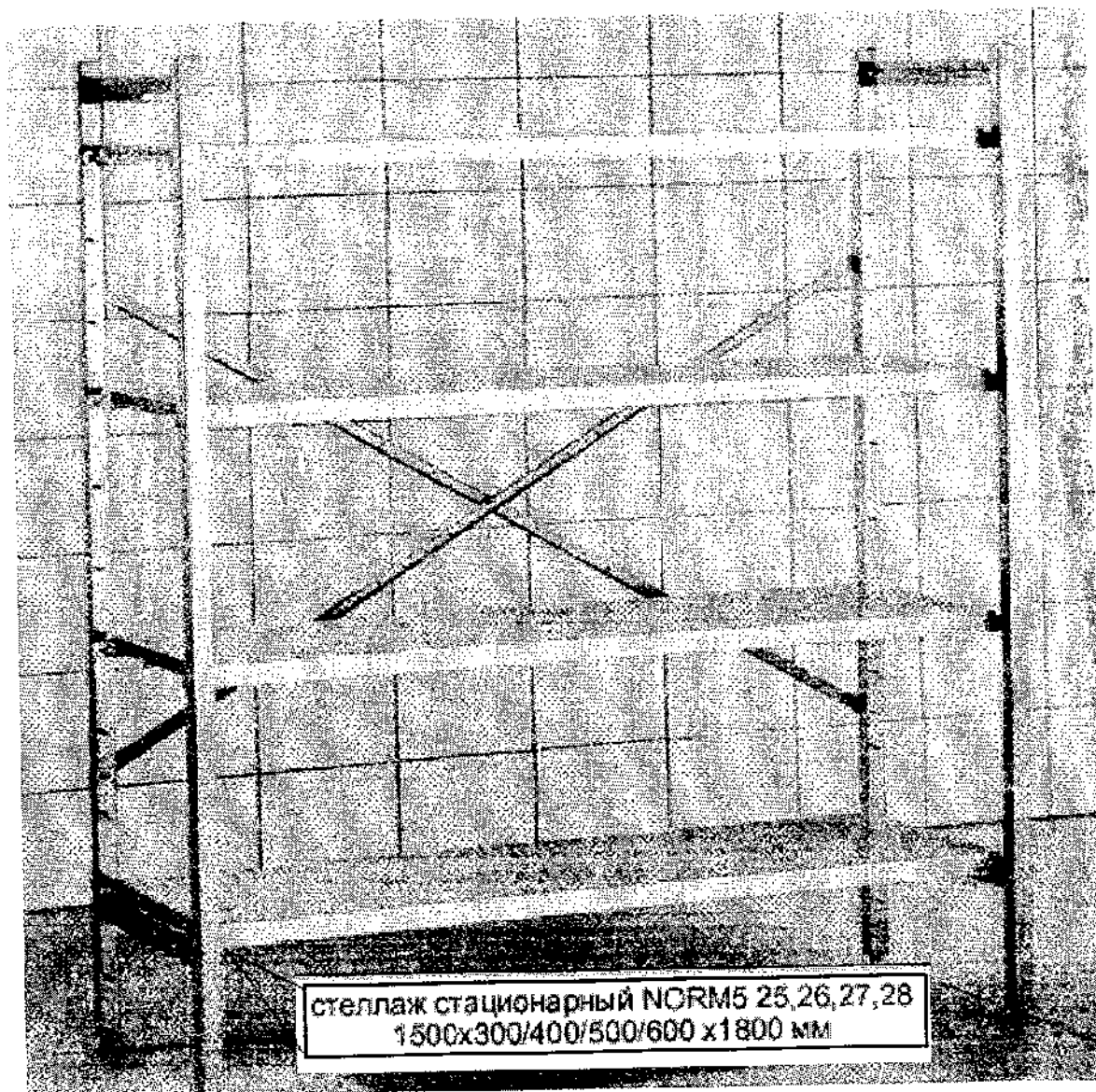

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже

Категория изделия _____
Производитель _____
Модель _____
Серийный номер/артикул _____
Дата продажи _____
Организация продавец _____
Подпись продавца _____
Изделие проверено, повреждений не имеет.
С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____

Штамп
продавца


Срок гарантийного использования — 3 года со дня ввода в эксплуатацию.
Срок гарантийного хранения — 2 года со дня приобретения.

По вопросам гарантии обращаться ООО «ХУПФЕР Китчен & Медикал» (ООО «ХУПФЕР КМ»), 123423, Россия, г. Москва, наб. Карамышевская, д.44, 3 этаж, помещение X, комната 3, +7 (495) 640-52-02, info@hupfer.ru.

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены.
При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.
Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях.
Изделие не должно носить следов механического или термического воздействия, а также следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

Отметка гарантийного центра

Дата	Описание	Гарантийный центр

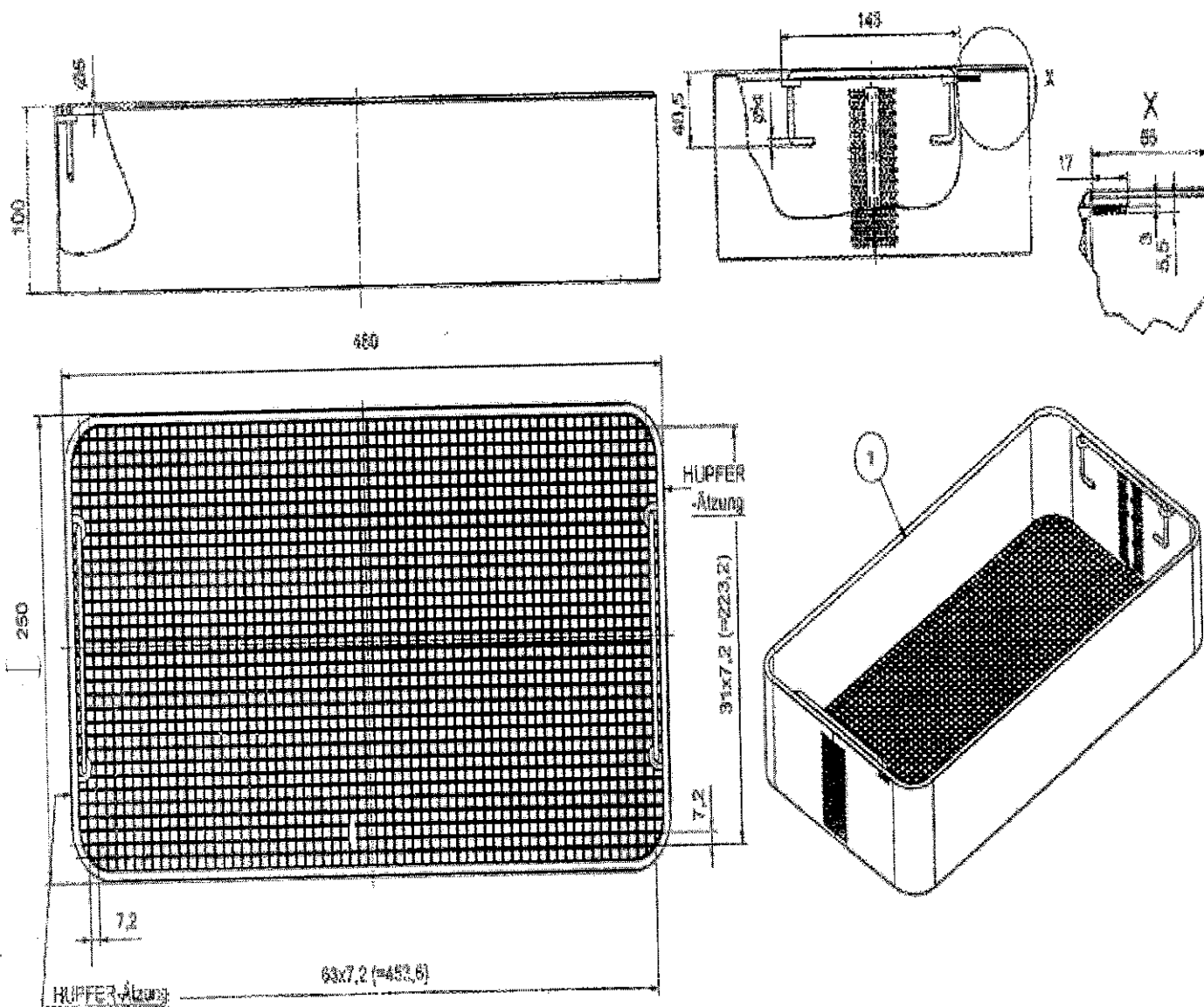

Корзина сеччатая с перфорированными стенками для всех моделей стеллажей, тележек, столов

09.07.2020 08:04
Az.: 39/20
D18/D2712-20

Nr. 0141 /2020 der Urkundenrolle

The Notary Public asked the Appearer whether he or any member of his firm had acted in the matter which is the subject of this instrument, except in a notarial capacity. The Appearer replied in the negative.

I
Notary Public
Dr. Reinhard Rehse
with official residence at

Borkener Str. 2
D-48653 Coesfeld
Germany

Fon: + 49 (0) 2541 - 84570
Fax: + 49 (0) 2541 - 845710

certify that the above signature personally today in my presence by the following person:

Surname	: Pohlschmidt
Forename	: Manfred
Former surname	: Pohlschmidt
Date of birth	: May 13 th , 1955
Place of birth	: Sassenberg
Nationality	: German
Commercial domicile	: Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld / Germany

The Appearer identified himself by his identity card
Number: L7JG9GP63
Authority: city of Sassenberg
Date of issue: 24.05.2017
Date of expiry: 23.05.2027

173

Der Notar fragte den Erschienenen, ob er oder eine der mit ihm beruflich verbundenen Personen in einer Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb der Amtstätigkeit als Notar tätig ist oder war. Dies wurde von ihm verneint.

Ich
Notar

Dr. Reinhard Rehse
mit dem Amtssitz in

Borkener Str. 2
48653 Coesfeld
Deutschland


Tel: 02541 - 84570
Fax: 02541 - 845710

beglaubigt, hiermit, dass die obige Unterschrift heute in meiner Gegenwart eigenhändig durch folgende Person vollzogen wurde:

Name : Pohlschmidt
Vorname : Manfred
Geburtsname : Pohlschmidt
geb. am : 13. Mai 1955
geb. in : Sassenberg
Staatsangeh. : deutsch
dienstansässig : Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld

Der Erschienene weist sich aus durch seinen Bundespersonalausweis Nr.: L7JG9GP63
der Stadt Sassenberg
Ausstellungsdatum : 04.05.2017
Gültigkeitstag : 03.05.2027

Coesfeld, Thursday, July 09, 2020 / Donnerstag, 09. Juli 2020

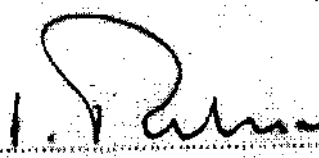
(Unterschrift/Signature)
(Dr. Rehse, Notar)
(Dr. Rehse, Notary Public)

189
Перевод с английского и немецкого языков на русский язык

«Согласовано»
Управляющий
«ХУПФЕР Металлверке ГмбХ & Ко. КГ»
Манфред Полцимидт

Штамп:
«ХУПФЕР Металлверке ГмбХ & Ко. КГ»
(HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG)
Дизельштрассе 20 • D-48653 Кассель
А/я 1463 • D-48653 Кассель
Тел.: +49 (0) 25 41 / 805-0 Факс: +49
info@hupfer.de • www.hupfer.de

/Подпись/ Подпись

« ____ » июня 2020 г.

Руководство по эксплуатации

Комплект мебели медицинской лабораторной с принадлежностями.
Производства: «ХУПФЕР Металлверке ГмбХ & Ко. КГ» (HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG)

Текст на русском языке

09.07.2020 08:04
Дело 39/20
D18/D2712-20

Номер документа 0141 в нотариальном реестре за 2020 г.

Нотариус спросил, действовал ли заявитель или какой-либо участник его фирмы, не в качестве нотариуса по вопросу, являющемуся предметом настоящего правового акта. Ответ на вопрос был отрицательным

Настоящим я,

нотариус
Др. Рейнхард Ресе
с местонахождением офиса по адресу:
D - 48653 Косфельд
Боркенер Штр. 2
Германия

Тел.: +49 (0) 2541-84570
Факс: +49 (0) 2541-845710

удостоверяю, что поставленная выше подпись была поставлена сегодня в моем присутствии собственноручно нижеуказанным лицом:

Фамилия:	Полшмидт
Имя:	Манфред
Прежняя фамилия:	Полшмидт
Дата рождения:	13 мая 1955 г.
Место рождения:	Зассенберг
Гражданство:	немецкое
Служебный адрес:	Дизельштрассе 20, 48653 Косфельд/Германия

Заявитель подтверждает личность посредством удостоверения личности.
Номер: L7JG9GP63
Орган выдачи: Зассенберг
Дата выдачи: 24.05.2017
Действительно до: 23.05.2027

Нотариус спросил, действовал ли заявитель или какой-либо участник его фирмы, не в качестве нотариуса по вопросу, являющемуся предметом настоящего правового акта. Ответ на вопрос был отрицательным

Настоящим я,

нотариус
Др. Рейнхард Ресе
 с местонахождением офиса по адресу:
 D - 48653 Косфельд
 Боркенаер Штр. 2
 Германия

Тел.: +49 (0) 2541-84570
 Факс: +49 (0) 2541-845710

удостоверяю, что поставленная выше подпись была поставлена сегодня в моем присутствии собственноручно нижеуказанным лицом:

Фамилия:	Полшмидт
Имя:	Манфред
Прежняя фамилия:	Полшмидт
Дата рождения:	13 мая 1955 г.
Место рождения:	Зассенберг
Гражданство:	немецкое
Служебный адрес:	Дизельштрассе 20, 48653 Косфельд

Заявитель подтверждает личность посредством удостоверения личности номер:
 L7JG9GP63, г. Зассенберг
 Дата выдачи: 24.05.2017
 Действительно до: 23.05.2027

г. Косфельд, четверг, 09 июля 2020 г./ 09 июля 2020 г.

/Подпись/
 (Др. Ресе, нотариус)/ (Др. Ресе, нотариус)

/Тисненая гербовая печать/: Др. Рейнхард Ресе* Нотариус в г. Косфельд

Перевод указанного документа с английского и немецкого языков на русский язык выполнен переводчиком
 Чигриновой Юлией Александровной. Перевод является правильным, точным и полным.

Чигринова Юлия Александровна

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Двадцать шестого марта две тысячи двадцать первого года

Я, Гарин Игорь Владимирович, нотариус Санкт-Петербурга, свидетельствую подлинность подписи переводчика Чигриновой Юлии Александровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 78/63-н/78-2021-9-1451.

Уплачено за совершение нотариального действия: 500 руб. 00 коп.

И.В. Гарин



Итого в настоящем документе 176 листов

