

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Алеф»




А.В. Звездин

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Приспособления ортопедические для стопы по ТУ 32.50.22-006-
49991213-2018»**

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алеф», г.
190031, г. Санкт-Петербург, ул.Ефимова 1/4

Адрес места производства: 197101, г. Санкт-Петербург, ул.Кронверкская
д.23, лит. А

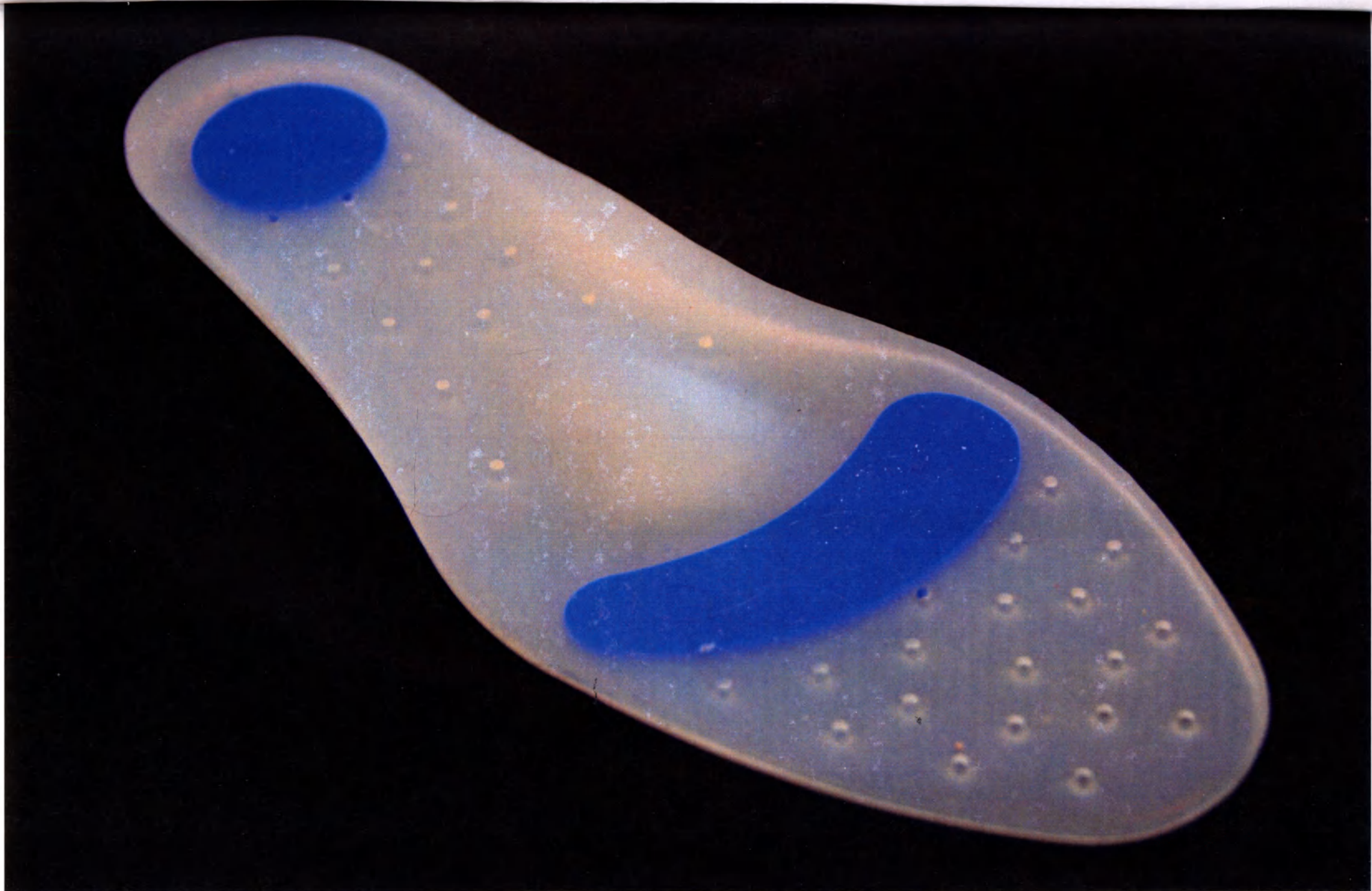

Стельки ортопедические, артикул С-101



СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

**СТЕЛКИ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ**

ОПИСАНИЕ: силиконовые стельки с пеном.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: применяются для амортизации ударной нагрузки на стопы во время ходьбы и бега. Предотвращают боль в суставах, сухожилиях и подшвенной части стопы. Распределают равномерно давление по всей поверхности стопы, а перфорация улучшает циркуляцию воздуха в обуви. Встроенный пеноматериал поддерживает стопу, уменьшая усталость и болезненность. Рекомендуется при начальной степени синдрома диабетической стопы и при ревматоидном артрите.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: вложить стельки в обувь гладкой стороной вниз. Изделия предназначены для закрытой обуви.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: регулярно промывать изделие теплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размерный ряд (в скобках указаны размер обуви): S (39/40), M (41/42), L (43/44).

В упаковке 2 шт.

Состав: медицинский силикон, пигмент для окрашивания.


Арт. С-101 www.alef-ortho.ru

Срок годности (хранения): 6 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.

Дата изготовления: 10.2018г.
Номер серии: 010

Продавец (организация, реализующая продукцию потребителю в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Эфимовая д. 1/4,
тел. 8 (812) 327-40-79

ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Эфимовая д. 1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-499912-13-0518

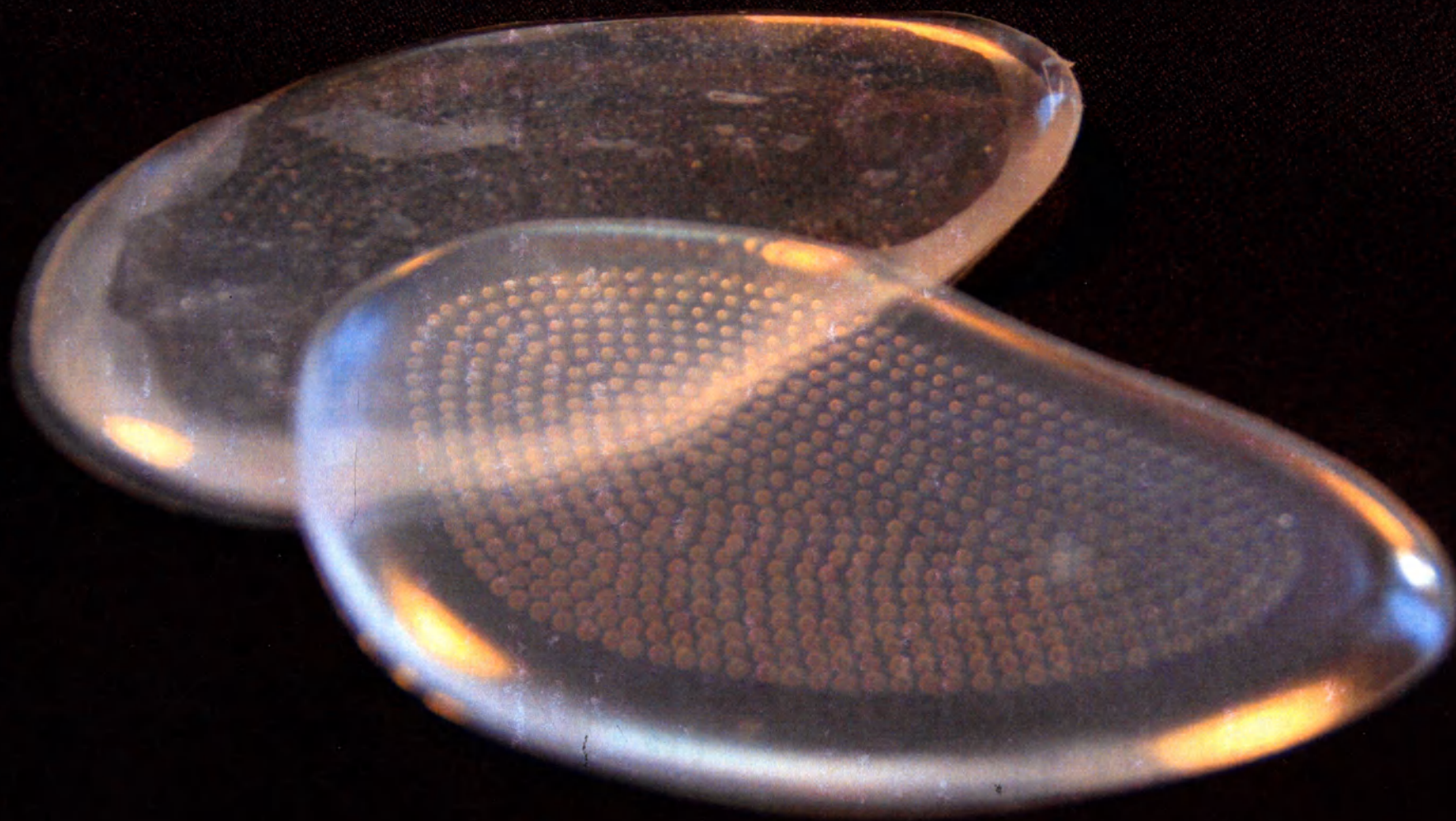

Подушечки защитные ортопедические, артикул С-201

ПОДУШЕЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

ОПИСАНИЕ: силиконовые подушечки под передний отдел стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: снижают нагрузку на переднюю часть стопы, предотвращают появление мозолей и натоптышей. Защищают от натираний и скольжения стопы в обуви.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: отделить подушечки от защитного слоя, вложить в обувь гладкой стороной вниз и крепко прижать подушечки к подошве.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размер универсальный

В упаковке 2 шт


Состав: медицинский силикон

Арт. С-201

www.alef-orto.ru

ПОДУШЕЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ


АЛЕФ

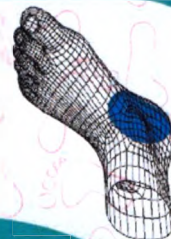

ПОДУШЕЧКИ ЗАЩИТНЫЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня подписки при соблюдении
норм эксплуатации
Дата изготовления: 10.2018
Номер серии: 010
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4
Тел. 8 (812) 327-50-79
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-89891213-2018



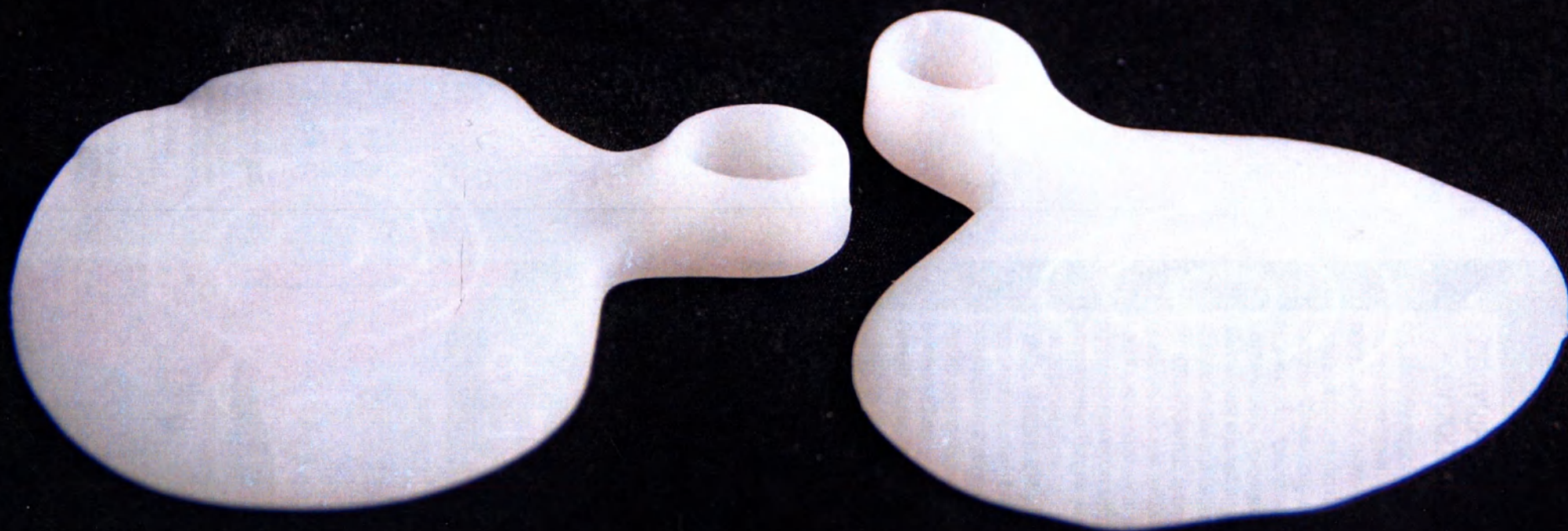

Подушечки защитные ортопедические, артикул С-205

ПОДУШЕЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

ОПИСАНИЕ: Метатарзальные подушечки под передний отдел стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

используются для коррекции плоскостопия, снижения болевых ощущений в переднем отделе стопы, препятствуют образованию «натоптышей». Предотвращают образование мозолей и загробления кожи. Предназначены для закрытой обуви.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: сухие подушечки присыпать тальком, продеть второй палец ноги в кольцо подушечки, так чтобы подушечка прилегала к ступне рельефной поверхностью. Подушечки предназначены для закрытой обуви.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размер универсальный

В упаковке 2 шт

Состав: медицинский силикон

Арт. С-205

www.alef-orto.ru


ПОДУШЕЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

АЛЕФ




ПОДУШЕЧКИ ЗАЩИТНЫЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Срок годности (хранения) 5 лет со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении
норм эксплуатации
Дата изготовления: 10.2018г
Номер серии: 010
Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4
тел. 8 (812) 327-50-79
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018

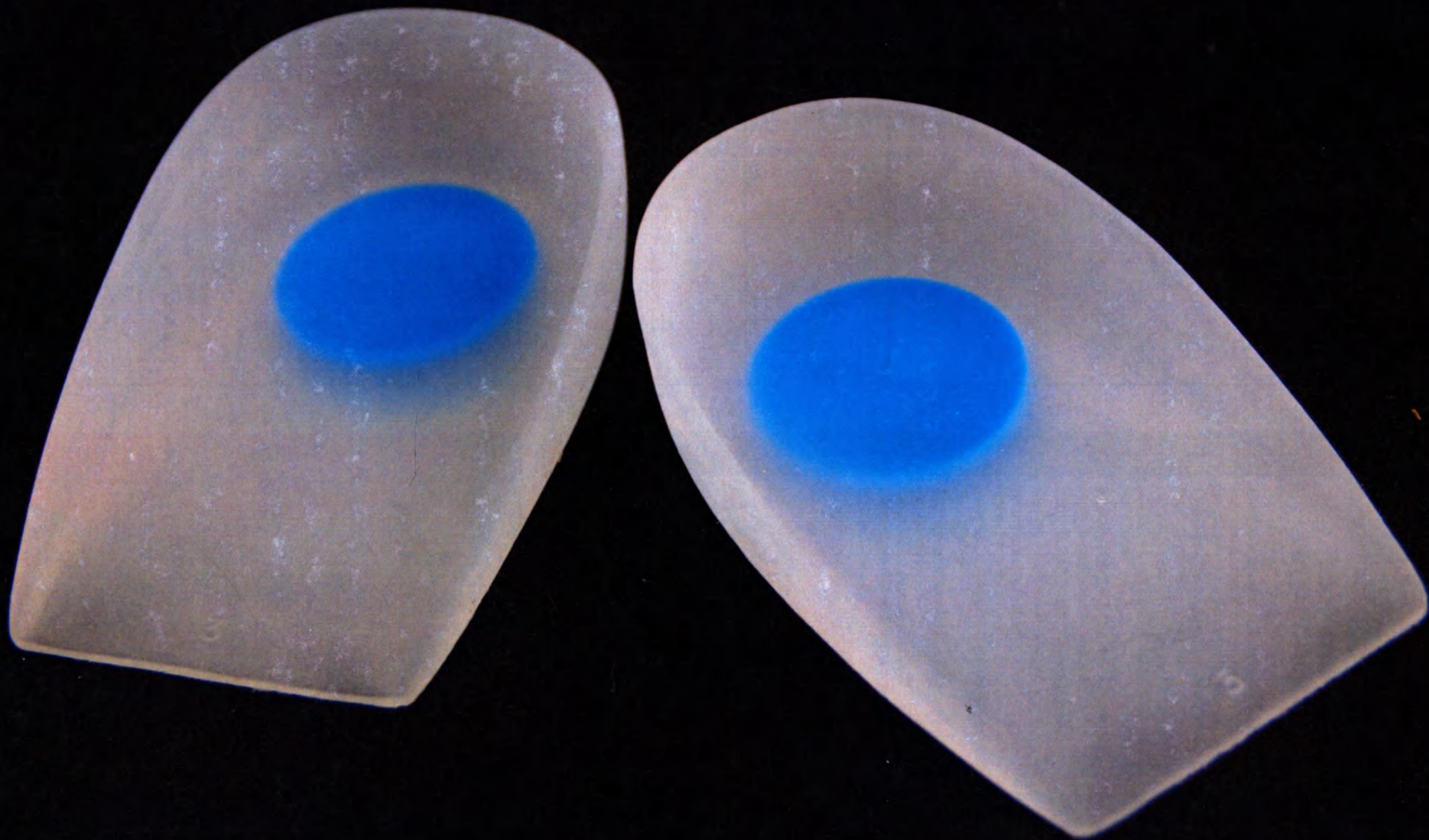

Подпяточники ортопедические, артикул С-301

ПОДПЯТОЧНИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

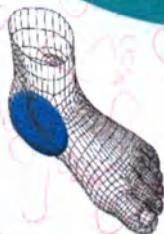

АЛЕФ

ПОДПЯТОЧНИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ



Арт. С-301

www.alef-ortho.ru

**ПОДПЯТОЧНИКИ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Предназначены для анатомически правильного положения пятки. Используются при пяточной шпоре, сухости и трещинах кожи в области пятки. Помогают подогнать по ноге слишком просторную обувь, уменьшают ударные нагрузки на стопу, суставы ног и позвоночник при ходьбе, обеспечивают комфорт и удобство при ходьбе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Вложить подпяточник в обувь гладкой поверхностью вниз.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: Регулярно промывать изделие теплой водой с мылом.

Размерный ряд: S, M, L.
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Материал: медицинский силикон, пигмент для окрашивания.

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.



Дата изготовления: 10.2018г


Номер серии: 010



Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79



ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018

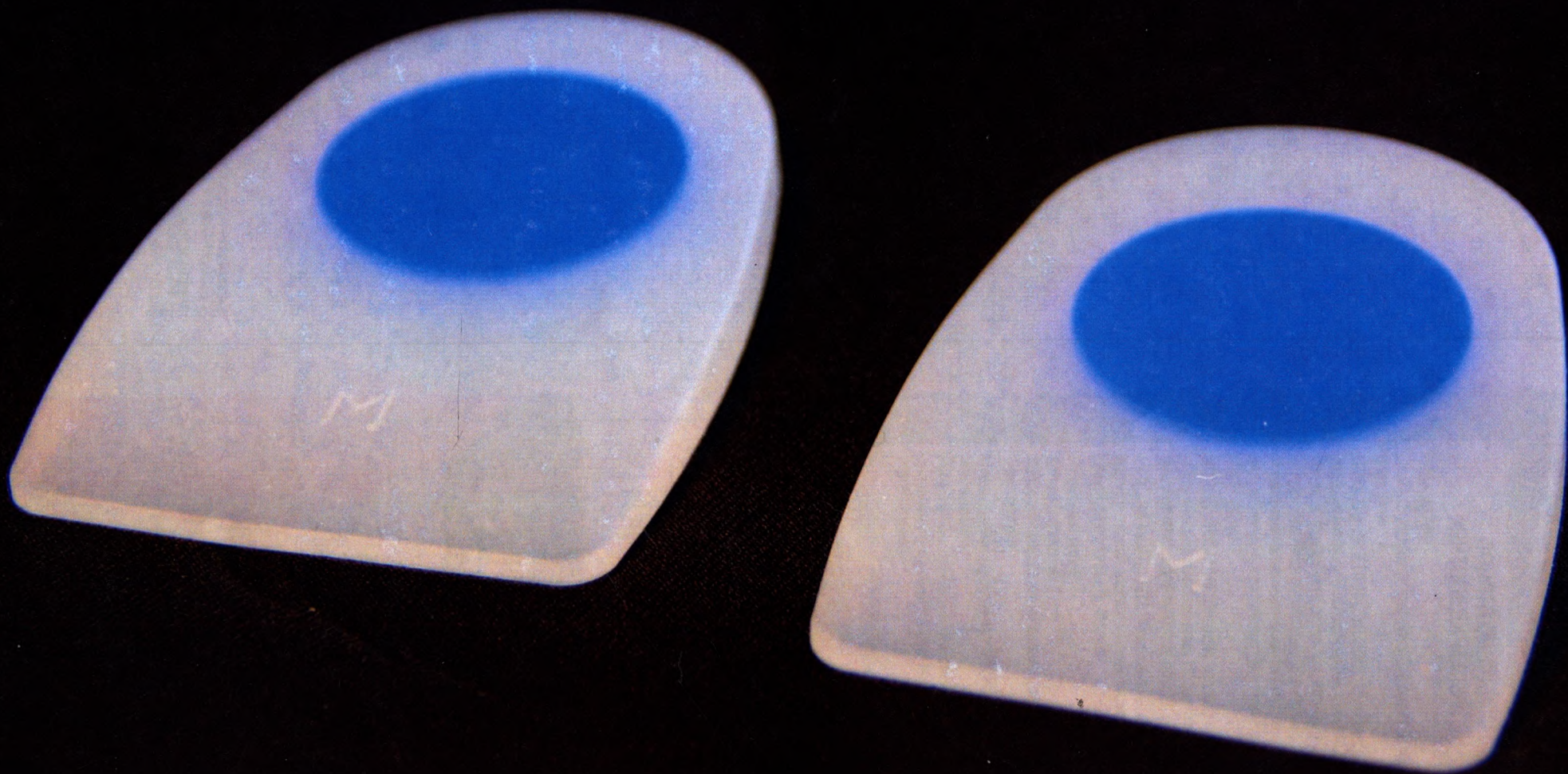

Подпяточники ортопедические, артикул С-305

ПОДПЯТОЧНИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

ОПИСАНИЕ:

Подпяточник амортизирующий, с двумя зонами плотности

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Снижают ударную нагрузку в области пятки, уменьшают болевые ощущения в пятке при пяточной шпоре. Рекомендуются также для людей, страдающих сахарным диабетом и с нарушениями кровообращения в нижних конечностях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Вложить подпяточники в обувь гладкой стороной вниз. Подпяточники предназначены для закрытой обуви.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: Регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размерный ряд: S, M, L.

Кол-во в упаковке: 2 шт.

Материал: медицинский силикон, пигмент для окрашивания.

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.


Арт. С-305

www.alef-orto.ru



ПОДПЯТОЧНИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

АЛЕФ

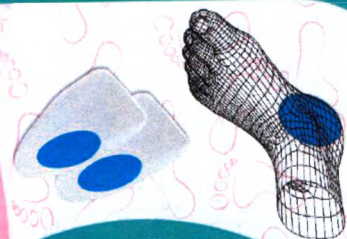


ПОДПЯТОЧНИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79
И изготовлено по ТУ 32.50.22-006-1999/1213-2018
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4

Номер серии: 010

Дата изготовления: 10.2018г.



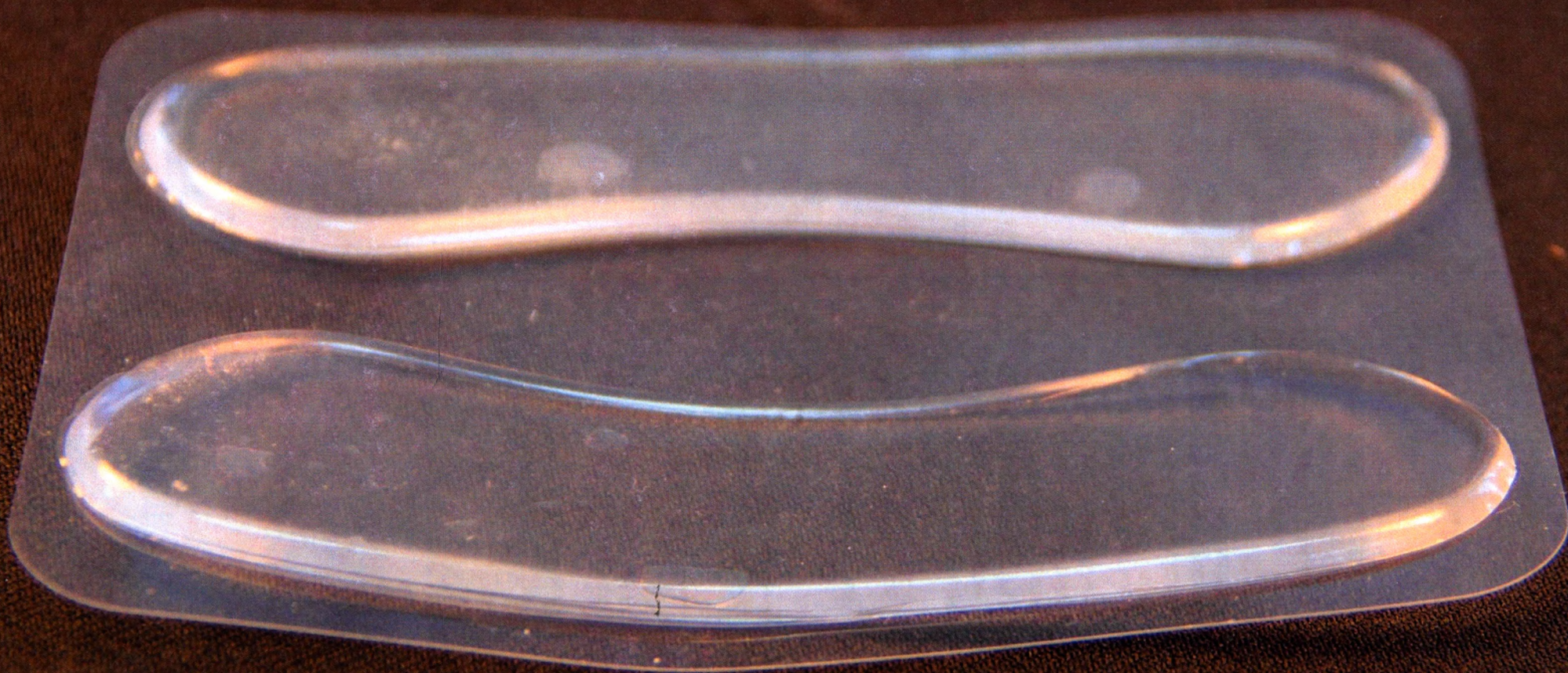

Накладки защитные, артикулы С-401

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

ОПИСАНИЕ: Вкладыш для защиты заднего отдела стопы

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Предназначены для устойчивой поддержки ноги в закрытой обуви. Защищают пяточную область от излишнего давления и натирания о задник обуви. Невидимы при использовании и подходят для любого типа обуви. Рекомендуются для новой, нерасношенной обуви, а также для обуви с твердым задником.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: отделить наклейки от защитного слоя и приклеить их к внутренней поверхности задника обуви.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: регулярно промывать изделие теплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размер универсальный.

В упаковке 2 шт.

Состав: медицинский силикон.

Арт. С-401

www.alef-orto.ru

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

АЛЕФ



НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ


Срок годности (хранения) 5 лет со дня изготовления
Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении
норм эксплуатации

Дата изготовления: 10.2018
Номер серии: 010

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ)
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79

ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4
Идентификационный номер по ТУ 32 50 22-006-49991213-2018



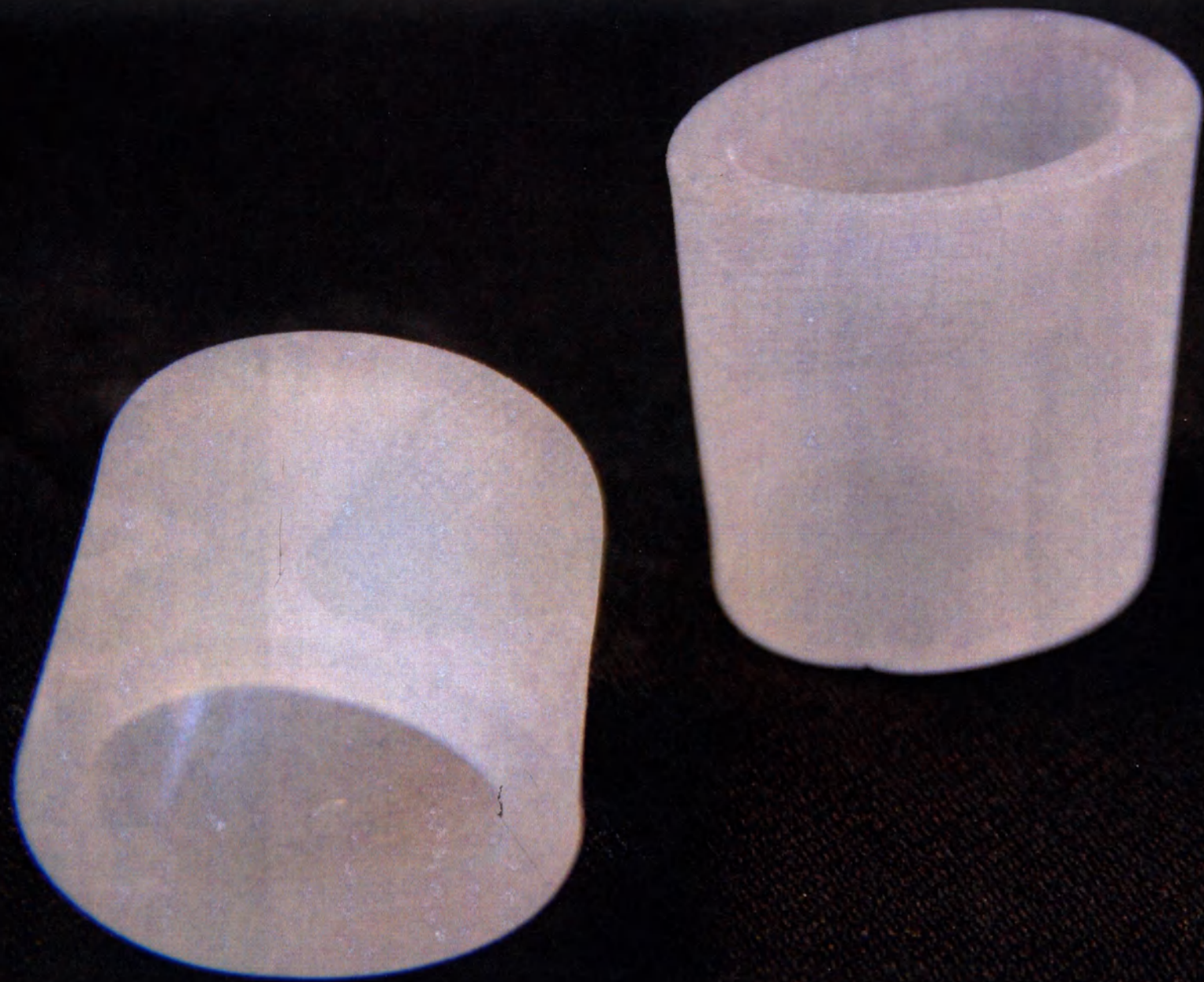


Накладки защитные, артикулы С-410

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Арт. С-410

L

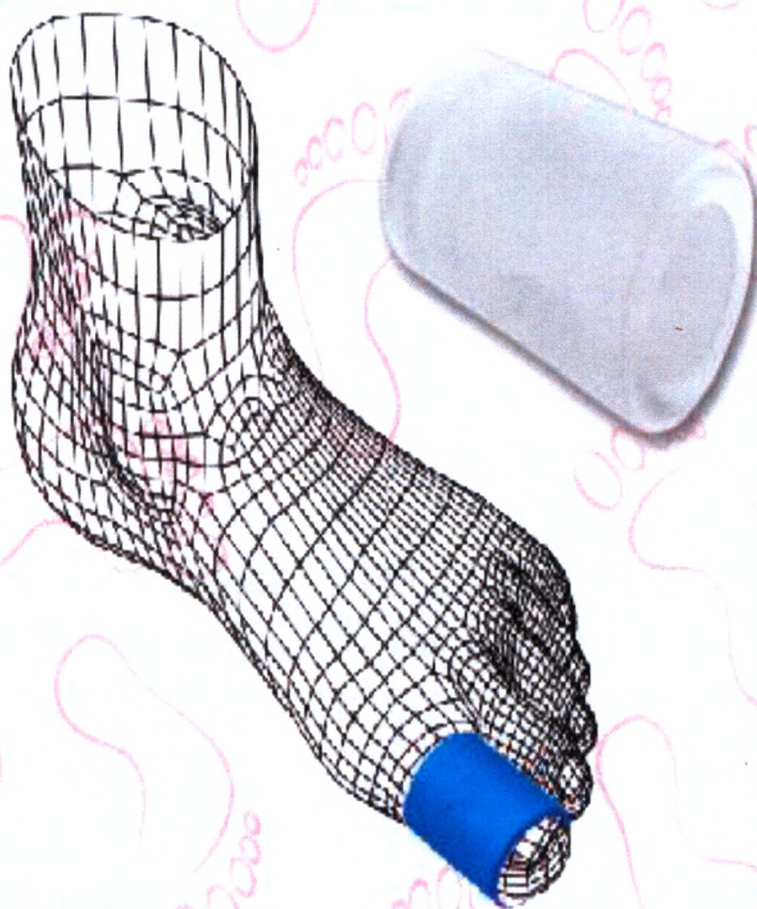

 АЛЕФ

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Показания к применению:

Арт. С-410

Снижают нагрузку на воспаленные участки, предотвращают образование мозолей и травмирования пальцев об обувь. Также используются для локальной фиксации перевязочных средств.

Размерный ряд: S, L

В упаковке 2 штуки

Состав: медицинский силикон

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.



Дата изготовления: 10.2018г

Номер серии: 010

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79



ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018

АЛЕФ




Накладки защитные, артикулы С-411

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Арт. С-411

L

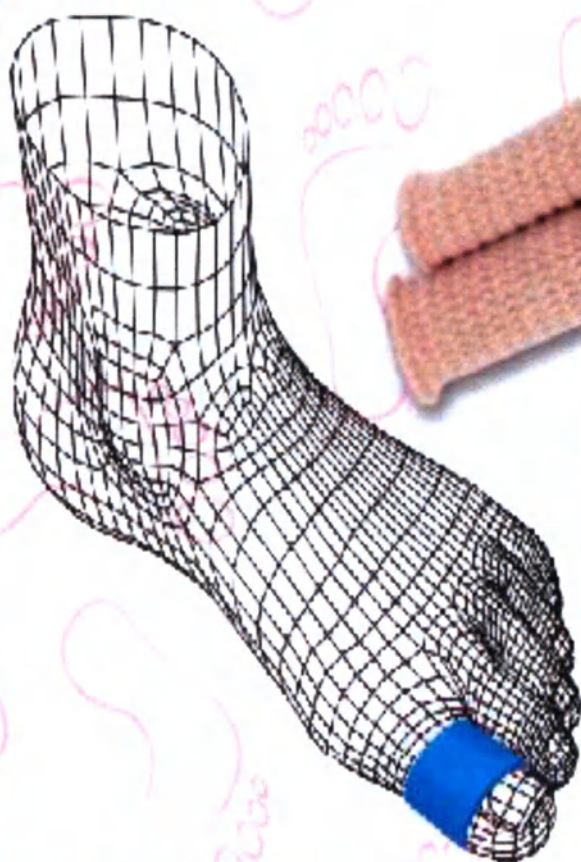

 АЛЕФ

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Двухслойный защитный протектор на пальцы стоп изготовлен из мягкого эластичного силикона, покрытого трикотажем. Обрезается на необходимую длину, согласно потребностям.

Арт. С-411

Показания к применению:

Снижают нагрузку на воспаленные участки, предотвращают образование мозолей и травмирования пальцев об обувь. Уменьшают давление и трение пальцев во время ходьбы и бега, ускоряют процесс заживления шрамов и закрытых ран.

Размерный ряд: S, L

В упаковке 1 штука

Состав: медицинский силикон, трикотажное полотно

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.



Дата изготовления: 10.2018г


Номер серии: 010

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79



ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018


 АЛЕФ

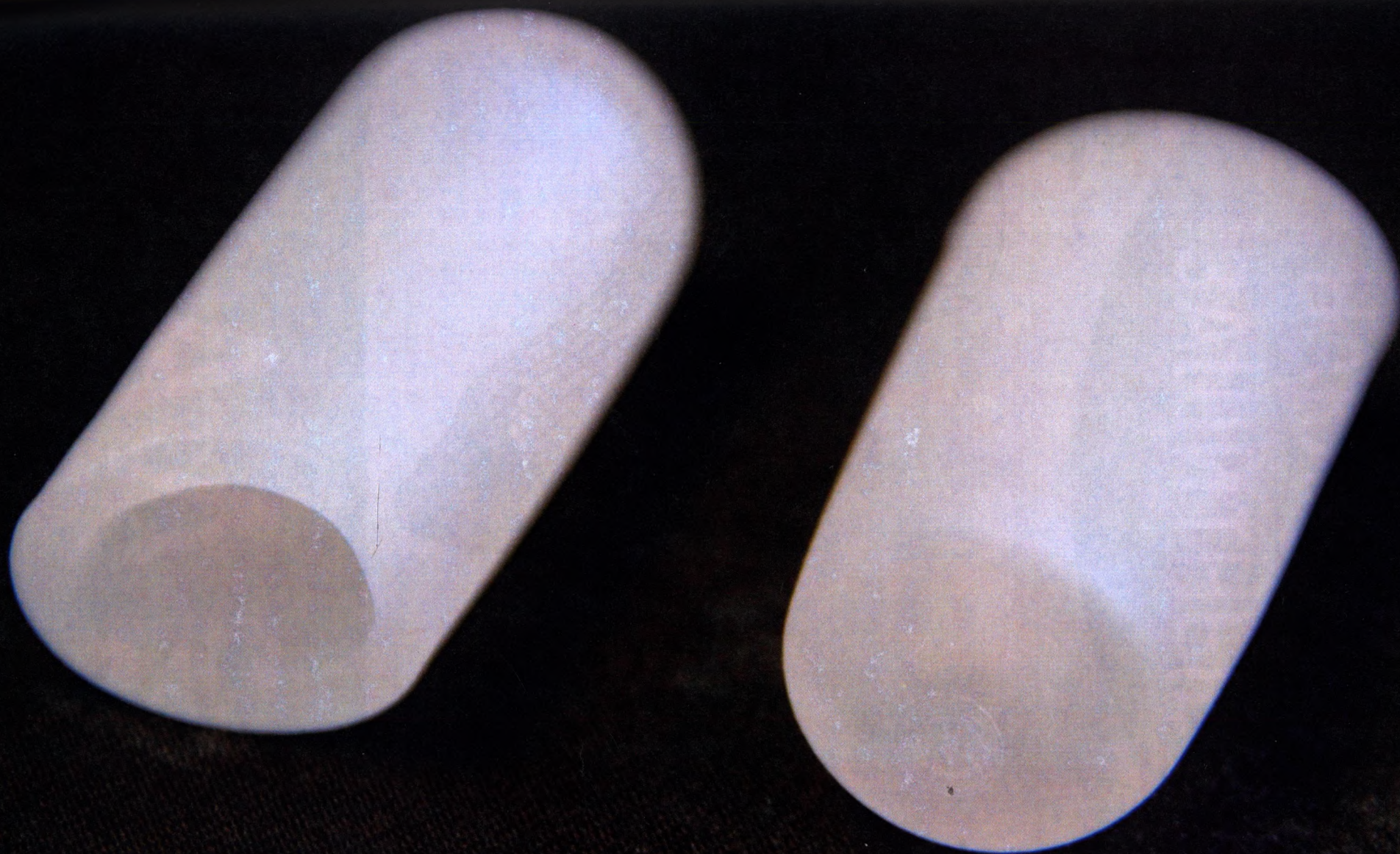

Накладки защитные, артикулы С-420

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Арт. С-420

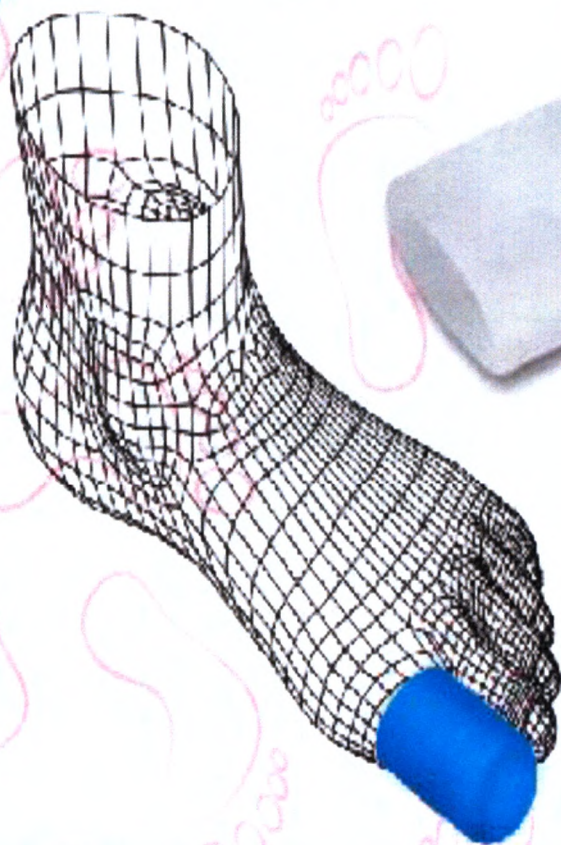

 АЛЕФ

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Показания к применению:

Арт. С-420

Снижают нагрузку на воспаленные участки, предотвращают образование мозолей и травмирования пальцев об обувь. Рекомендуются при молоткообразных и когтеобразных пальцах ног, вросших ногтях, при ампутациях фаланг пальцев. Может использоваться для локальной фиксации перевязочных средств.

Уход за изделием: Регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов

Размерный ряд: S, L

В упаковке 2 штуки

Состав: медицинский силикон, трикотажное полотно

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.




Дата изготовления: 10.2018г

Номер серии: 010

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79




ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018

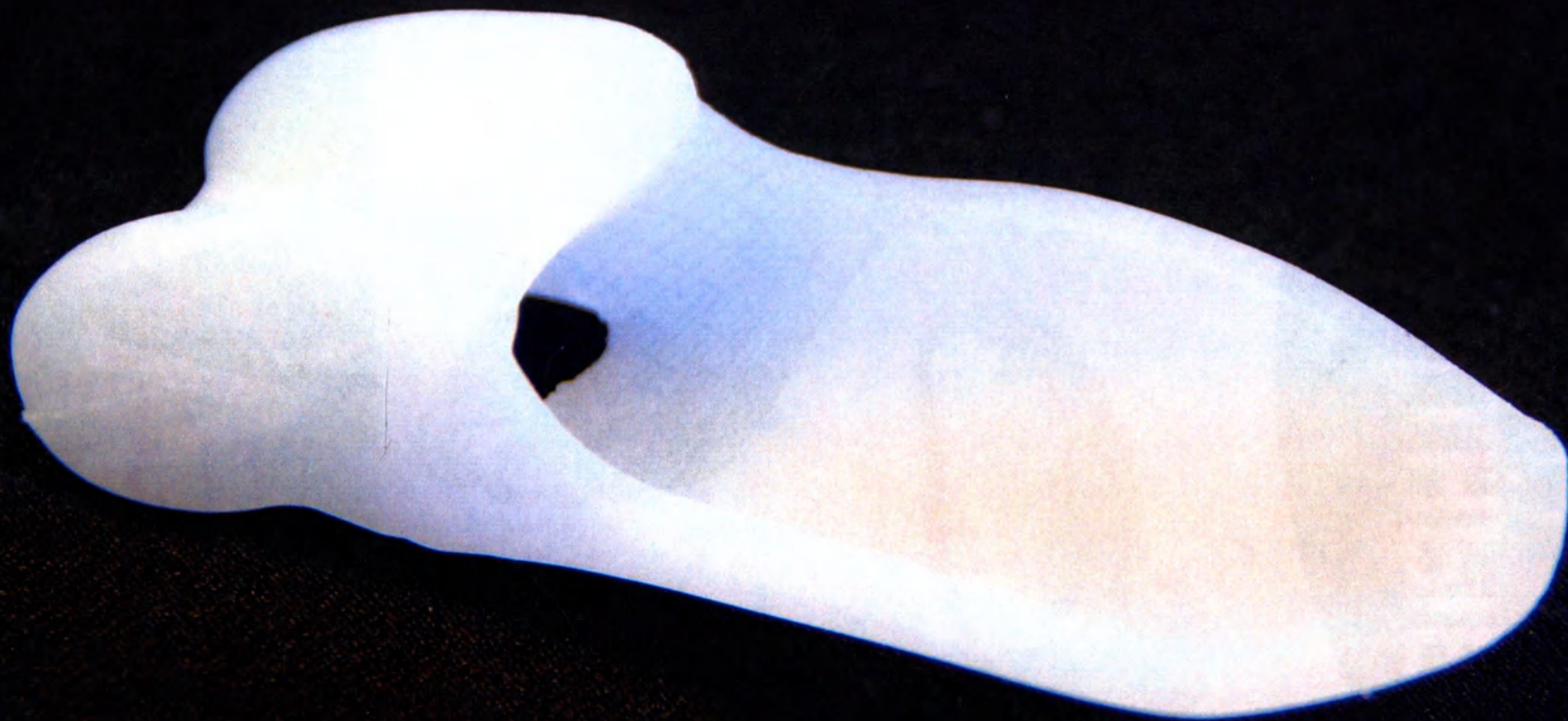

Накладки защитные, артикулы С-501

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Арт. С-501

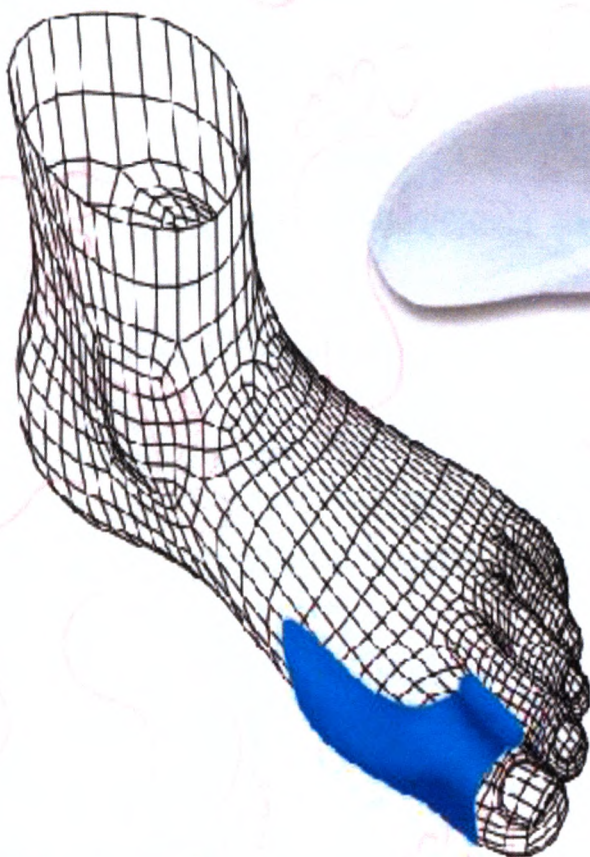

 АЛЕФ

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Арт. С-501

Показания к применению:

Защищают сустав большого пальца от трения, давления и образования потертостей. Снижают болевые ощущения в области большого пальца, создавая комфорт при ходьбе.

Использование:

Изделие промыть, высушить, присыпать тальком. Кольцо надеть на большой палец таким образом, чтобы корректор располагался между большим и вторым пальцем ноги. Не использовать, если кожа между пальцами воспалена или повреждена.

Уход за изделием:

Регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размер универсальный, подходит как для правой, так и левой ноги.

В упаковке 1 штука

Состав: медицинский силикон

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.



Дата изготовления:

10.2018г

Номер серии: 010

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):

ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4,

тел. 8 (812) 327-50-79



ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4

Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018




Накладки защитные, артикулы С-505

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Арт. С-505

L

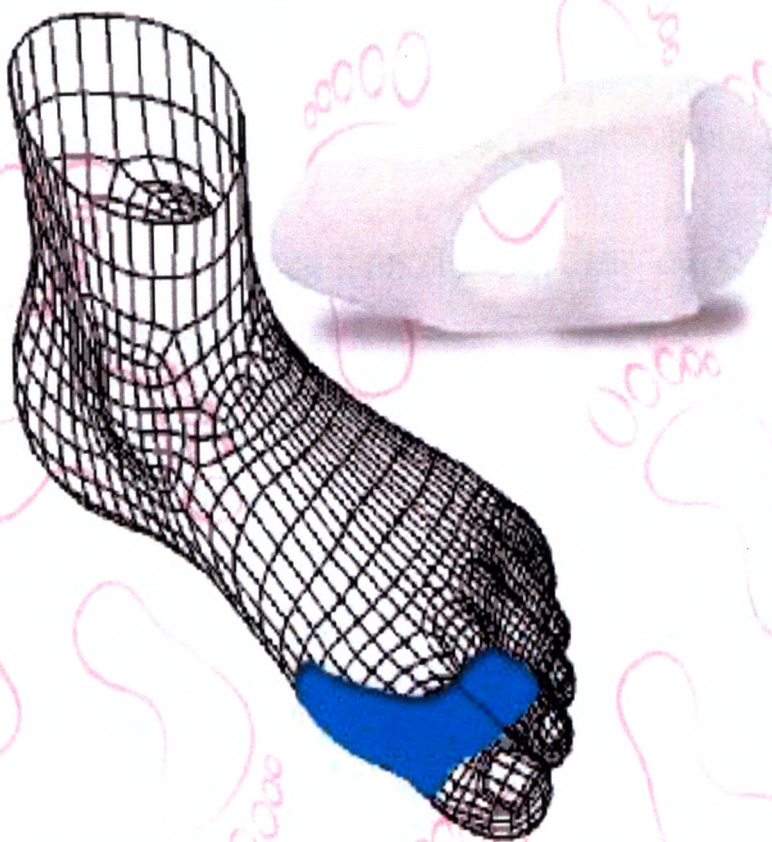

 АЛЕФ

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Показания к применению:

Арт. С-505

Предназначен для коррекции большого пальца при вальгусной деформации стопы. Разделяют заходящие друг на друга пальцы стопы. Уменьшают болезненное трение и давление, амортизируют ударные нагрузки при ходьбе. Оснащены кольцом, благодаря которому не сдвигаются во время ходьбы. Предназначены как в профилактике, так и в реабилитационных периодах.

Использование:

Изделие промыть, высушить, присыпать тальком. Изделие надеть на большой и второй палцы так, чтобы корректор располагался между ними. Не использовать, если кожа между пальцами воспалена или повреждена.

Уход за изделием:

Регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов

Размер универсальный, подходит как для правой, так и левой ноги

В упаковке 1 штука

Состав: медицинский силикон

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.



Дата изготовления: 10.2018г

Номер серии: 010

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79




ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018



Накладки защитные, артикулы С-530

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Арт. С-530

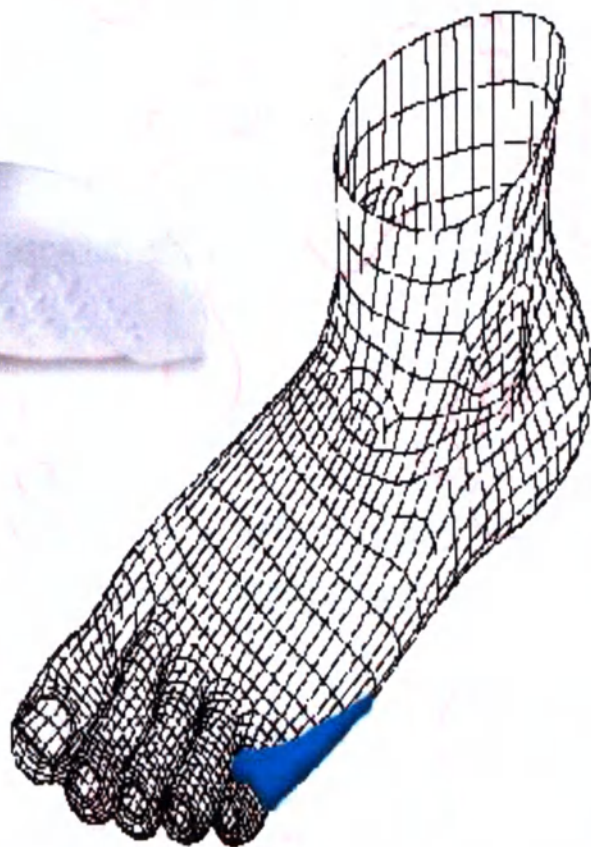

 АЛЕФ

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

Арт. С-530

Показания к применению:

Защищают сустав малого пальца стопы (мизинец) от давления, трения, образования потертостей и мозолей. Предохраняют мизинец, амортизируют ударные нагрузки, а также уменьшают болезненные ощущения, возникающие при ходьбе, особенно в узкой обуви. Рекомендуются для всех видов обуви.

Использование:

Изделие промыть, высушить, присыпать тальком. Изделие надеть на мизинец, защитной накладкой наружу. Не использовать, если кожа между пальцами воспалена или повреждена.

Уход за изделием:

Регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размер универсальный.

В упаковке 2 штуки

Состав: медицинский силикон

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.



Дата изготовления: 10.2018г

Номер серии: 010


Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79



ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018



Накладки защитные, артикулы С-510Т

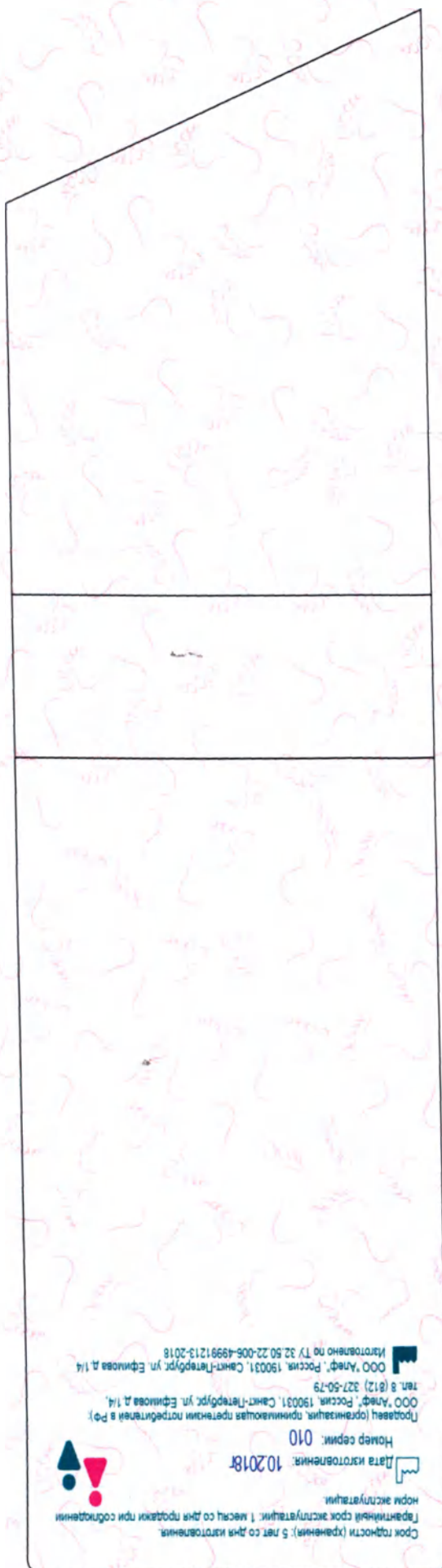

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ

ОПИСАНИЕ: эластичный бандаж со встроенным бурсопротектором.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Эластичные бандажи со встроенным гелевым бурсопротектором, защищают сустав первого пальца стопы при распластанности переднего отдела стопы и при вальгусной деформации первого пальца стопы. Защищают от чрезмерного давления, воспаления кожи, при трении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: чистое изделие надеть на ногу как носок, продев большой палец в специальное отверстие. При необходимости поправить силиконовую накладку так, чтобы обеспечить наибольший комфорт. Изделие подходит как для правой так и левой ноги.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размерный ряд: S, L

В упаковке 1 шт.

Состав: медицинский силикон, трикотажное полотно.

Арт. С-401

www.alef-orto.ru

НАКЛАДКИ ЗАЩИТНЫЕ



Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.
Дата изготовления: 10.2018г.
Номер сериала: 010
Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 14,
тел. в (812) 327-50-79
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 14
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2016



Разделители межпальцевые ортопедические, артикулы С-601

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Арт. С-601



 АЛЕФ

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Назначение/показания к применению:

Арт. С-601

Для уменьшения давления между пальцами при искривленных молоткообразных пальцах. Предотвращают трение, потертости и образование мозолей. Снимают болезненные ощущения и обеспечивают комфорт при ходьбе.

Уход за изделием: Регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размерный ряд: S, M, L

В упаковке 2 штуки

Состав: медицинский силикон

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.




Дата изготовления: 10.2018г

Номер серии: 010

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79




ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018

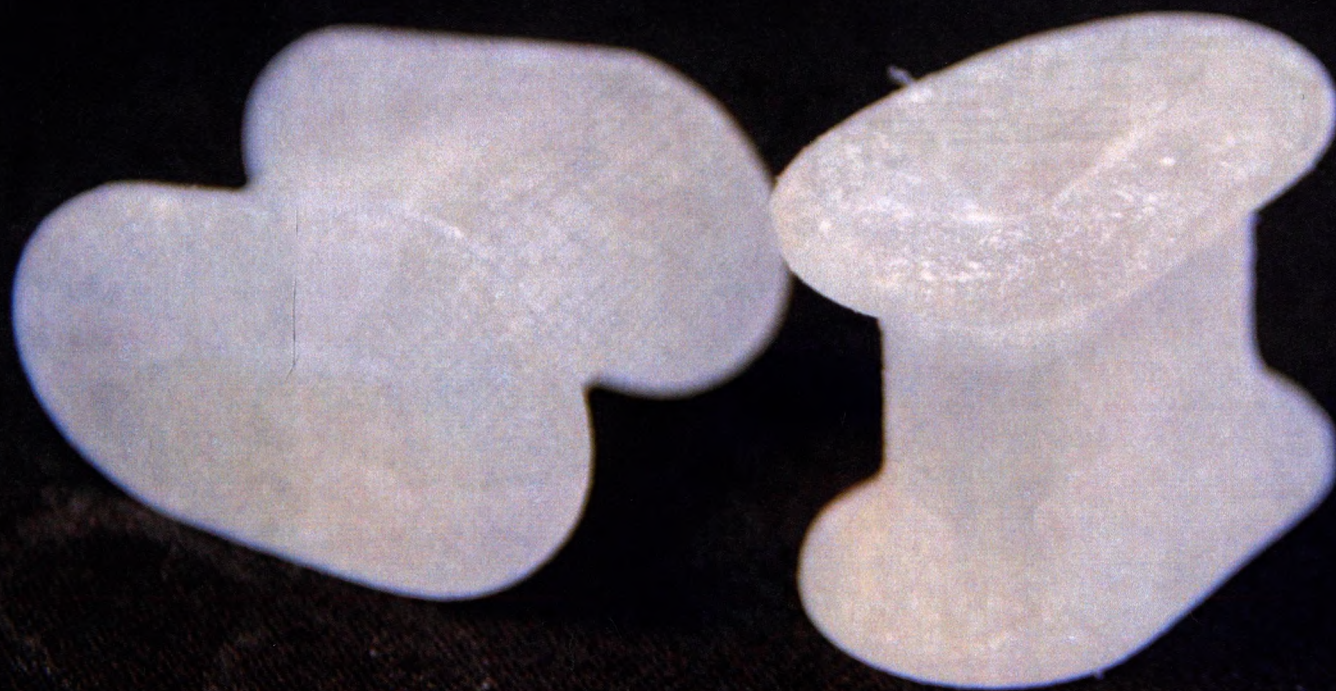

Разделители межпальцевые ортопедические, артикулы С-610

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Арт. С-610

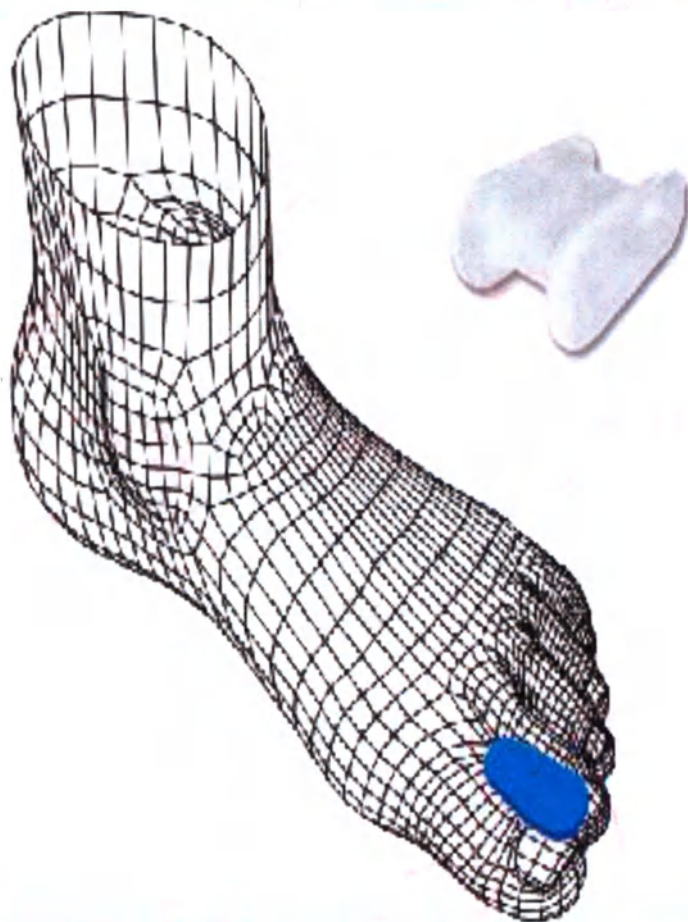

 АЛЕФ

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Назначение/показания к применению:

Арт. С-610

Разделяют пальцы стопы, снимают болевые ощущения в суставе большого пальца и предотвращают появление мозолей и натертостей. Рекомендованы для профилактики против образования «косточки».

Уход за изделием: Регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размерный ряд: S, M, L

В упаковке 2 штуки

Состав: медицинский силикон

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.




Дата изготовления: 10.2018г

Номер серии: 010

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4,
тел. 8 (812) 327-50-79




ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 1/4
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018

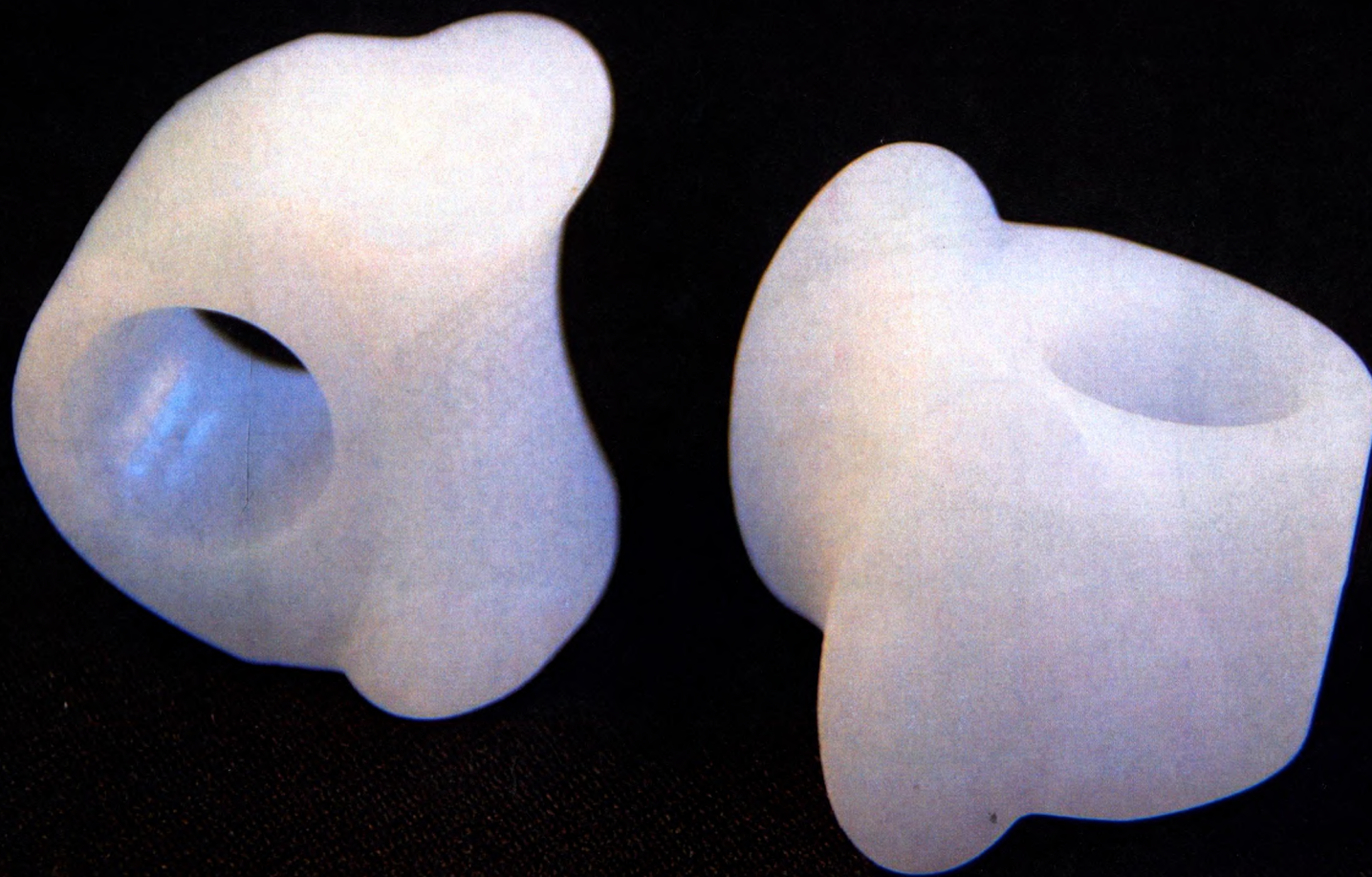

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Арт. С-615

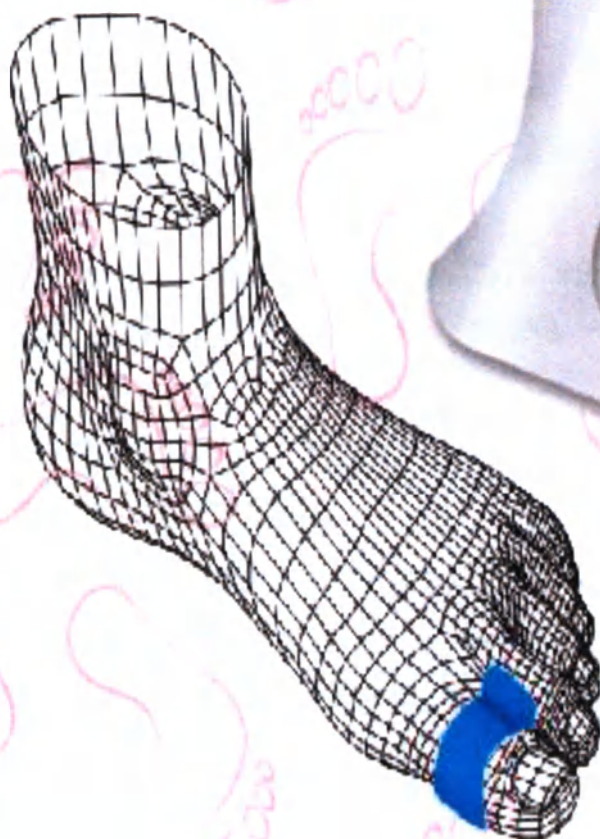

 АЛЕФ

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Назначение/показания к применению:

Арт. С-615

Предотвращают деформацию пальцев стопы, раздвигают искривленные молоткообразные пальцы стопы, уменьшают болезненное трение и давление. Рекомендуются для профилактики и лечения вальгусной деформации большого пальца стопы.

Использование: Изделие промыть, высушить, присыпать тальком. Кольцо надевают на большой или второй палец (как удобнее), располагая корректор между ними.

Уход за изделием: Регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размерный ряд: S, M, L

В упаковке 2 штуки

Состав: медицинский силикон

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.



Дата изготовления: 10.2018г

Номер серии: 010

Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):


ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4,

тел. 8 (812) 327-50-79



ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.1/4

Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018

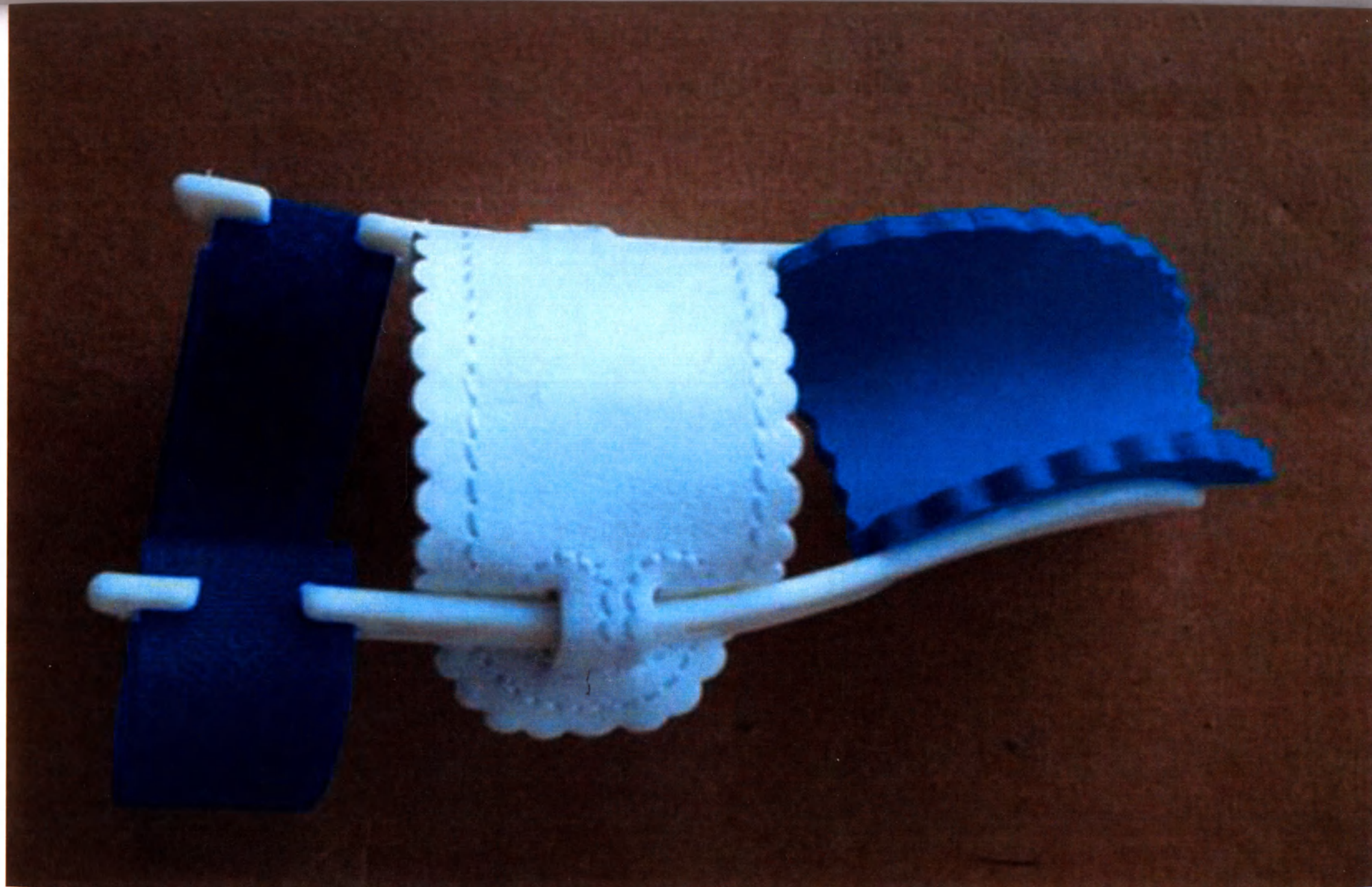

БАНДАЖ ПЛЮСНЕФАЛАНОВОГО СУСТАВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Предотвращает и лечит вальгусную деформацию большого пальца стопы в начальной и средней степени отклонения, уменьшает боль. Предотвращает развитие вальгусной деформации, нормализует тонус связок и мышц стопы и повышает эффективность реабилитации.

Помогает значительно уменьшить размер «косточки». Бандаж одевается на ночь – в нем нельзя ходить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Бандаж разрешается использовать только для той ноги, для которой он предназначен (правый/ левый).

Одеть бандаж на чистую стопу, так, чтобы большой и средний палец были разделены бандажом (накладкой к большому пальцу). Эластичный фиксатор должен располагаться с внутренней части стопы. Застегнуть застёжку, выбрав комфортную степень фиксации.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: Регулярно промывать изделие тёплой водой с мылом.

Размер: универсальный.

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Материал: полиуретановый пластик; силикон, искусственная кожа.

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 2 месяца со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.

Сторона: правый ☐
левый ☐

Арт. ФПС-201

www.alef-orto.ru

БАНДАЖ ПЛЮСНЕФАЛАНОВОГО СУСТАВА

АЛЕФ




БАНДАЖ ПЛЮСНЕФАЛАНОВОГО СУСТАВА

Исполнено по ТУ 32 50 22-006-49991213-2018
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ермакова д. 114
тел. 8 (812) 327-50-79
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ермакова д. 114,
Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ)

Номер серии: 010

Дата изготовления: 10.2018г.



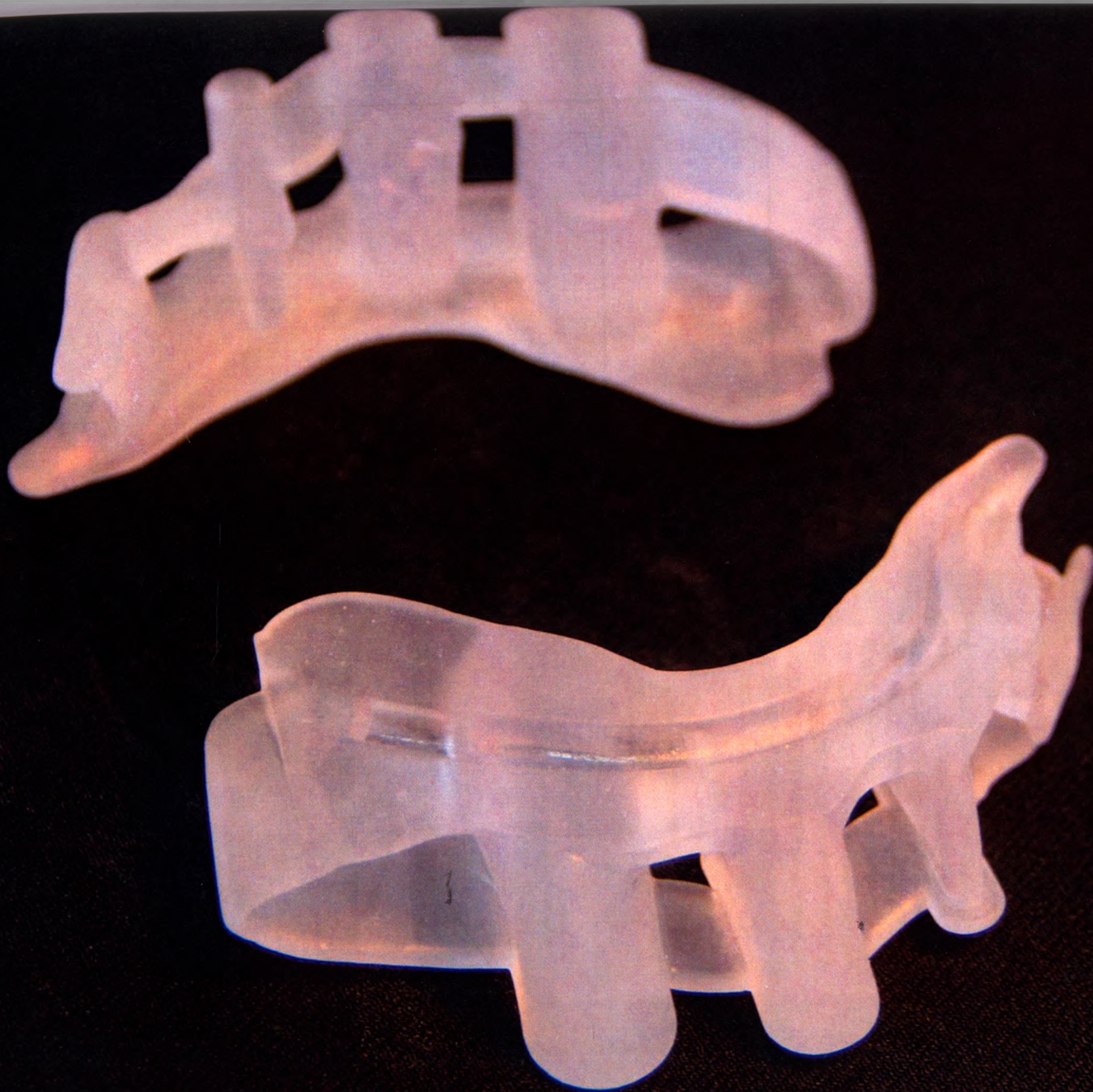

Разделители межпальцевые ортопедические, артикулы С-630

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

ОПИСАНИЕ: корректор 5-ти пальцев стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

предназначены для коррекции и профилактики вальгусной деформации стоп и позволяют эффективно улучшить и обезопасить суставы пальцев. Защищают суставы пальцев от давления, трения, образования потертостей, позволяют безболезненно носить обувь при искривленных пальцах ног, появлении «косточки» на суставах и ее воспалении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: изделие промыть, высушить, присыпать тальком. Надеть изделие так, чтобы перегородка большого пальца располагалась между большим и вторым пальцем ноги, амортизирующей подкладкой вниз. Не использовать, если кожа между пальцами воспалена или повреждена.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: регулярно промывать изделие теплой водой с мылом, сушить вдали от нагревательных приборов.

Размер универсальный

В упаковке 2 шт

Состав: медицинский силикон

Арт. С-630

www.alef-orto.ru

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

АЛЕФ



РАЗДЕЛИТЕЛИ
МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Срок годности (хранения): 5 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц со дня продажи при соблюдении норм эксплуатации.
Дата изготовления: 10.2018г.
Номер серии: 010
Продавец (организация, принимающая претензии потребителей в РФ):
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 14.
тел. 8 (812) 327-50-79
ООО "Алеф", Россия, 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 14.
Изготовлено по ТУ 32.50.22-006-49991213-2018



Проставлено:
кон. до: 46 (срок исцеления)



А.В. Здогун