

«Утверждаю»



Генеральный директор

«Фэлтония»

Алексеев А.А.

» августа 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения
(изделия медицинской техники)

«Ирригатор-аспиратор назальный BD5600 с принадлежностями»

производства: «Бремед Лимитед», Гонконг, Китай /
Bremed Limited, Hong Kong, China.

1. Назначение.
2. Основные технические характеристики.
3. Подготовка к работе и порядок использования.
4. Правила хранения и использования.
5. Очистка и дезинфекция.
6. Организация-изготовитель.


«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач

Профессор

Гончаров Н.Г.

«12»

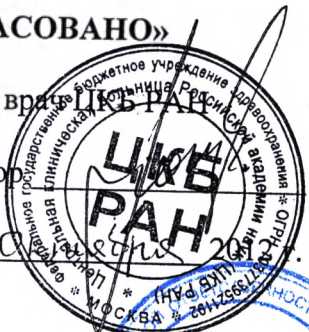

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

1. Назначение

Ирригатор-аспиратор назальный BD5600 с принадлежностями предназначен для гигиены носовой полости и лечения и профилактики простудных заболеваний у детей.

2. Основные технические характеристики

Объем резервуара для ирригации, мл	10
Объем резервуара для аспирации, мл	5
Размеры, мм (высота x ширина x длина)	116 x 60 x 60
Вес устройства, г	225
Электропитание, В/Гц	220/50
Сила всасывания / впрыскивания, кПа	50
Время подзарядки аккумуляторной батареи, ч	4

3. Подготовка к работе и порядок работы изделия

В состав ирригатора-аспиратора назального BD5600 с принадлежностями входят (рис.1):

- основной корпус (1);
- насадка для ирригации (состоящая из градуированного резервуара (2), крышки для резервуара (3) и соединительной трубки (4));
- насадка для аспирации (состоящая из резервуара для слизи (5), крышки для резервуара (6) и наконечника для насадки (7));
- дополнительная заглушка;
- дополнительный наконечник;
- сетевой адаптер (8);
- чехол;
- инструкция по применению.

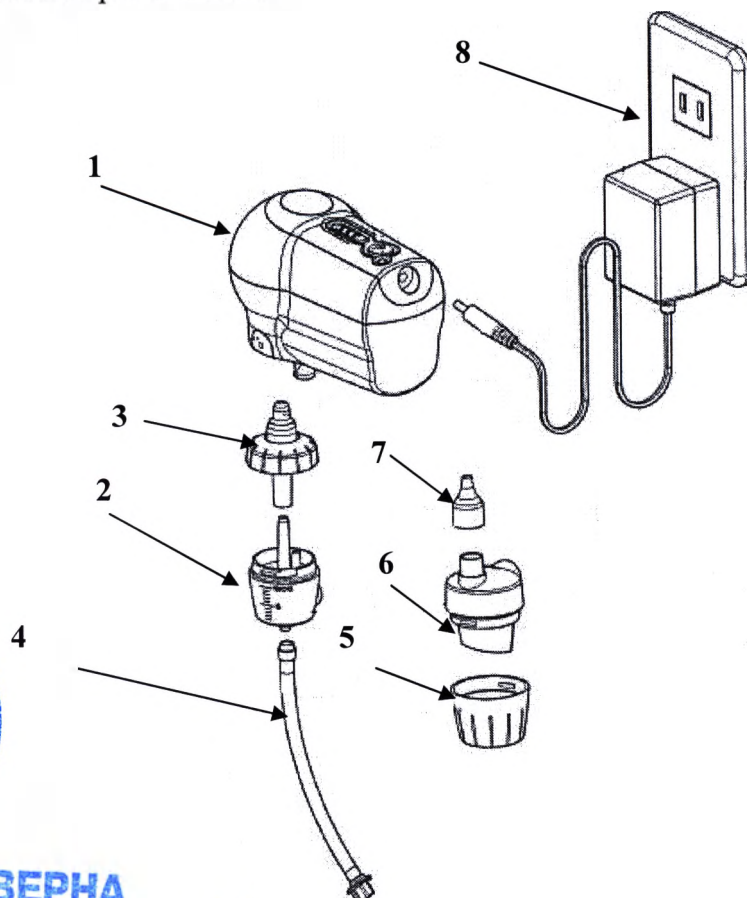


Рис. 1



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

Использование устройства с насадкой для аспирации (рис.2)

1. Соедините вместе составные части насадки для аспирации (резервуар для слизи, крышка для резервуара и наконечник для насадки).
2. Подсоедините насадку к устройству как показано на рисунке ниже.
3. Нажмите кнопку включения устройства и поднесите устройство к носу. Процесс аспирации начнется немедленно, как только наконечник насадки дотронется до слизи в носовой полости.

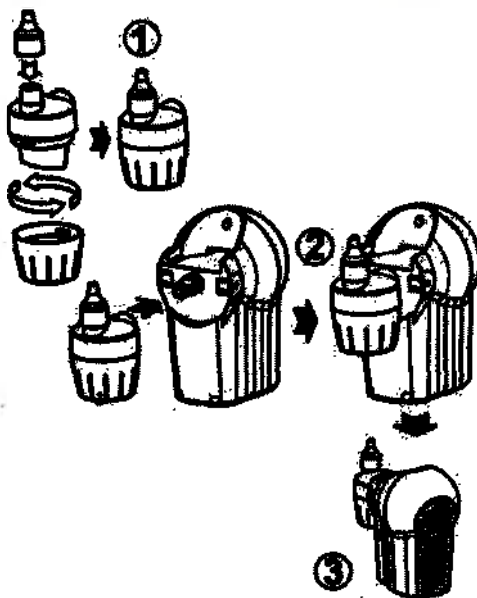


Рис. 2

Использование устройства с насадкой для ирригации (рис.3)

1. Соедините вместе составные части насадки для ирригации (резервуар для слизи, крышка для резервуара и наконечник для насадки).
2. Подсоедините насадку к корпусу устройства как показано на рисунке ниже.
3. Извлеките заглушку из бокового отверстия устройства.
4. Вставьте конец соединительной трубки в боковое отверстие.
5. Насадка для ирригации подсоединена к устройству.
6. Открутите крышку для резервуара, повернув её против часовой стрелки.
7. Залейте внутрь резервуара соляной или любой другой раствор для полоскания носа. Закройте крышку, повернув её по часовой стрелке.
8. Поднесите устройство к носу и нажмите кнопку включения устройства. Устройство автоматически начнет работу.

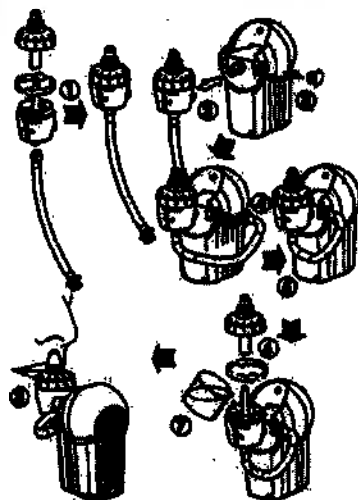


Рис. 3



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

4. Правила хранения и использования

Изделие предназначено для очищения и ирригации носовой полости, не используйте его для других целей.

Ирригатор-аспиратор назальный BD5600 предназначен для индивидуального пользования.

Не разрешайте детям пользоваться устройством самостоятельно.

Не держите насадку для аспирации в носовой полости в течение продолжительного времени. Для удаления слизи достаточно нескольких секунд.

Не используйте устройство, если в носовой полости есть повреждения, царапины, признаки воспаления, а также при носовом кровотечении.

Хранить изделие необходимо в сухом состоянии, защищать от воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур и пыли.

Хранить изделия при температуре от -20°C до 60°C и при относительной влажности от 10% до 95%.

Для переноски и хранения изделия используйте поставляемый в комплекте чехол.

Срок годности 5 лет от даты производства.

5. Очистка и дезинфекция

Устройство необходимо чистить после каждого применения для предотвращения загрязнений.

Корпус устройства рекомендуется протирать мягкой тканью, предварительно смоченной в воде или спиртовом растворе.

Съемные части устройства, а именно, насадка для аспирации, насадка для ирригации, накопник для насадки для аспирации, необходимо кипятить после каждого использования (рис. 4).



Рис. 4

6. Организация-изготовитель

«Бремед Лимитед», Гонконг, Китай / Bremed Limited, Unit 1104, 11/F., Two Harbourfront 22 Tak Fung Street, Hung Hom Kowloon, Hong Kong, China.

Генеральный директор
ООО «Фэлтония»

Алексеев А.А



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

**Приложение к инструкции по применению изделия медицинского назначения
(изделия медицинской техники)**

I. Ирригатор-аспиратор назальный BD5600, в составе:

1. Корпус основной.
2. Насадка для ирригации: резервуар градуированный; крышка для резервуара; трубка соединительная.
3. Насадка для аспирации: резервуар для слизи; крышка для резервуара; наконечник для насадки.
4. Заглушка дополнительная.
5. Наконечник дополнительный.
6. Чехол.
7. Адаптер сетевой.
8. Инструкция по применению.

II. Принадлежности:

1. Насадка для ирригации – не более 20 шт.
2. Насадка для аспирации - не более 20 шт.
3. Трубка соединительная для насадки для ирригации - не более 20 шт.
4. Заглушка дополнительная - не более 20 шт.
5. Наконечник дополнительный не более 20 шт.

Генеральный директор
ООО «Фэлтония»



Алексеев А.А.

« ____ » _____ 2012 г.



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5

лист(ов)

Генеральный директор
ООО "Фэлтония"

А.А.Алексеев

