

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Среда для оплодотворения и культивирования эмбрионов
GM501 Cult with Gentamicin
GM501 Cult with Gentamicin and Phenolred

(Штутгарт) GYNEMED GmbH KG
(GYNEMED GmbH & Co. KG)
Издателя медицинского назначения
Любекер Штр. 9, D-23758, Ленцлин (Lubecker Str. 9,
D-23758 Lenzen)
Тел.: 04363-90329-0, факс: 90329-19

Страница утверждения

Утверждает: Д-р Фабьян Селл (Fabian Sell)

С. Ленцлин 27.09.2019 / *Handwritten signature*

GYNEMED GmbH KG, Любекер Штрассе 9, D-23758 Ленцлин, Германия
Телефон: +49 (0) 4363 903 29-0,
Факс: +49 (0) 4363 903 29-19
E-mail: info@gynemed.de
Web-site: <http://www.gynemed.de>

2019

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Среда для оплодотворения и культивирования эмбрионов, в следующих вариантах исполнения (далее «середы», «изделия»):

1. GM501 Cult with Gentamicin - 1 флакон (20 мл), 1 флакон (50 мл)
2. GM501 Cult with Gentamicin and Phenolred - 1 флакон (20 мл), 1 флакон (50 мл)

Каталожный номер

GM501 Cult with Gentamicin 20 мл	4 GM 501H-G-20
GM501 Cult with Gentamicin 50 мл	4 GM 501H-G-50
GM501 Cult with Gentamicin and Phenolred 20 мл	4 GM 501H-PR-G-20
GM501 Cult with Gentamicin and Phenolred 50 мл	4 GM 501H-PR-G-50

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Среда предназначена для оплодотворения и культивирования эмбрионов человека с первого дня до стадии blastocysts специалистами ЭКО, также может использоваться для переноса эмбрионов.

Область применения: акушерство и гинекология.

Потенциальными потребителями данного медицинского изделия являются женщины, проходящие процедуру ЭКО, ИКСИ независимо от того, кто из пары – мужчине или женщине – страдает бесплодием. Потенциальными пользователями являются специалисты по ЭКО (лаборанты, эмбриологи и врачи).

3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование компонента	Содержание, %	
	GM501 Cult with G-bi-amine	GM501 Cult with Gentamicin and Phenolred
Вода (H ₂ O)	> 90,0	> 90,0
Натрия хлорид (NaCl)	< 1,0	< 1,0
Калия хлорид (KCl)	< 0,1	< 0,1
Кальция хлорид (CaCl ₂ · 2H ₂ O)	< 1,0	< 1,0
Магния сульфат (MgSO ₄ · 7H ₂ O)	< 0,1	< 0,1
Натрия перхлорат (C ₂ H ₃ ClO ₄ Na)	< 1,0	< 1,0
Калия дигидрофосфат (KH ₂ PO ₄)	< 1,0	< 1,0
D-глюкоза (C ₆ H ₁₂ O ₆)	< 1,0	< 1,0
Натрия лактат (C ₃ H ₅ NaO ₃) (50% раствор)	< 1,0	< 1,0
Натрия гидрокарбонат (NaHCO ₃)	< 1,0	< 1,0
Этилениминтетрауксусная кислота/EDTA (HOOCCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ COOH)	< 1,0	< 1,0
Незаменимые аминокислоты/Solution (NON-ESS AA)	< 1,0	< 1,0
Заменимые аминокислоты/Solution (ESS+ESS AA)	< 1,0	< 1,0
L-аспаргин-L-глутамин (C ₄ H ₈ N ₂ O ₄)	< 1,0	< 1,0
Человеческий сывороточный альбумин (HSA) (10 г/л)	< 1,0	< 1,0
Гентамицин (C ₁₆ H ₂₇ N ₅ O ₆) (10 мг/л)	< 1,0	< 1,0
Фенолрозовый краситель (C ₁₀ H ₈ O ₃ S ₂)	-	< 1,0

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
4. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛАХ ЖИВОТНОГО И (или) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕКАРСТИВНЫХ СРЕДСТВАХ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	7
6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ	7
7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ	7
8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ПРИМЕНЕНИИ	8
9. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	8
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
11. ФОРМА ВЫПУСКА	11
12. СТЕРИЛЬНОСТЬ	12
13. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ТЕРМИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ	12
14. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	12
15. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, СРОК ГОДНОСТИ	12
16. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	13
17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	13
18. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	14
19. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	14
20. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
21. УПОМОЩАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ	14
СИНВОЛЫ НА УПАКОВКЕ	15

Компонент	Функциональное значение
Физиологические соли	Осмотическая регуляция
Глюкоза, перхлорат, лактат	Источник энергии
Аминокислоты	Регуляторы метаболизма, осмотически активные вещества и буферы внутриклеточного pH
Бикарбонат	pH-буфер
EDTA	Хелатирующий агент, связывающий двувалентные катионы металлов, таким образом предотвращает формирование нежелательных ацидных форм катионов
Человеческий сывороточный альбумин (HSA)	Собинизирует клеточные мембраны эмбриона в среде. Поддерживает оптимальное осмотическое давление, является носителем и источником основных молекул, требующихся эмбриону, связывается с отходами метаболизма клеток, и потенциальными загрязнителями, выходящими в среду. Упрощает операции с гаметами за счет предотвращения адгезии к поверхности и силу пассивных потенциальных утилитарных сетей
Гентамицин	Минимизация рисков микробной контаминации, которая может повлиять на эмбрионы
Фенолрозовый краситель	Индикатор pH

Среда GM501 Cult with Gentamicin представляет собой готовую к использованию буферную прозрачную бесцветную жидкость без запаха.

Среда GM501 Cult with Gentamicin and Phenolred представляет собой прозрачную жидкость розового цвета без запаха.

Продолжительность нахождения среды в полости и слизистой оболочке матки. Продолжительность сохранения остатков среды в полости матки после переноса эмбриона.

Поскольку среда GM501 Cult with Gentamicin и GM501 Cult with Gentamicin and Phenolred вступает в непосредственный контакт со слизистой оболочкой матки пациента во время переноса эмбрионов, изделие классифицируется как «система доставки и интратерапевтическая система человека» с «кратковременным» (< 24 ч) продолжительностью контакта в соответствии с ISO 10993-1. Как следствие, были рассмотрены следующие проблемы совместимости:

• **Химическая характеристика: составление химических веществ**
Степень требуемой характеристики ISO 10993-1 зависит от вида и длительности контакта медицинского изделия с организмом пациента и его рисков в клиническом применении. Среда для оплодотворения и культивирования эмбрионов не является инвазивной, вступает в контакт только со слизистой оболочкой матки пациента, а риски при клиническом применении снижены до приемлемого уровня. Контакты со слизистой оболочкой матки ограничены небольшим объемом (не более 0,2 мл, в зависимости от используемого аппарата для переноса эмбрионов) и обычно один раз за менструальный цикл.

Более того, среда GM501 Cult with Gentamicin и GM501 Cult with Gentamicin and Phenolred применяется в клинической практике, и обширные данные контроля качества (MEA) уже продемонстрировали, что среда не содержит токсичных компонентов. Кроме того, клинические оценочные исследования (в соответствии с MFDDEV 2.7.1), основанные на опыте длительного использования, лабораторию и клинические данные, показали, что изделия безопасны для использования по назначению. Не наблюдалось побочных реакций у пациентов во время клинического использования изделий.

 000 ЦПМИ  INFO@CPMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

(Иркутск 2001/83. РС и соотвечствующие подразделения АРМ) (Иркутск 2001/83. РС и соотвечствующие подразделения АРМ)

Иллюстрация является объектом (картинка) и имеет предметное содержание.

[illegible]

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

(*) Организация со всеми органами как с потенциальными носителями ИИП или с ними.

Или человек мыслит, что он действует в непосредственный контакт со своим телом.

1) Инкубатор с CO₂ при 37°C;
2) Чашки Петри.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

(M501) Cell with Gentamicin and Phenol red co-solvent is cross-correlated

— *Упрощает операции с камерами за счет преобразования вращений и поворотов*

2. Сериализация каждой партии в соответствии с ГОСТ 4076-76;

- в случае изменений в процессе производства продукции РАТ и/или других

1) Женское общество.
... Женское общество, связанное с отсутствием образования

2) Механизм действия (механизм, или механизм)

ИЗДАНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ ИЗМЕНЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

NAME: _____

Не загрязняться.
Не активировать после активации спрея гранулы.
Настоящий спрей не должен активировать спрей гранулы.
Примечание: от воздействия света.
Хранить при температуре от +2°C до +8°C.
Состав: 6 мл воды, 2 мл 10% раствора.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СПРЕЙ-ГРАНУЛ

Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.

13. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Не повреждаться.
Не повреждаться.
Не повреждаться.
Не повреждаться.
Не повреждаться.
Не повреждаться.
Не повреждаться.
Не повреждаться.
Не повреждаться.
Не повреждаться.

14. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕТЕРМИНАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Методы и средства детерминации и предупреждения.
Методы и средства детерминации и предупреждения.
Методы и средства детерминации и предупреждения.
Методы и средства детерминации и предупреждения.
Методы и средства детерминации и предупреждения.
Методы и средства детерминации и предупреждения.
Методы и средства детерминации и предупреждения.
Методы и средства детерминации и предупреждения.
Методы и средства детерминации и предупреждения.
Методы и средства детерминации и предупреждения.

15. СТЕПЕНЬ

Степень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

11. ФОРМА ВЫПУСКА

Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

1) Все компоненты медицинского назначения должны соответствовать стандартам.
2) Упаковка должна быть чистой, сухой, защищенной от влаги.
3) Срок годности должен быть указан на упаковке.
4) Упаковка должна быть чистой, сухой, защищенной от влаги.
5) Упаковка должна быть чистой, сухой, защищенной от влаги.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

Простое «одношаговое» культивирование

Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

Простое «одношаговое» культивирование

Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

Культивирование микроорганизмов, требующих по питанию (ЖК)

Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

Культивирование микроорганизмов, требующих по питанию (ЖК II)

Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)	Масса (г)
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU