





**Набор реагентов для
иммунохроматографического
выявления антигена SARS-CoV-2
в мазке из носа и носоглотки,
слюне человека (NanoCare COVID-19
Antigen (Ag)). Lot 210311-03A**

СОСТАВ НАБОРА:

- 1) Тестовая кассета – 1 шт.;
- 2) Пробирка с буфером для экстрагирования
биологического образца – 1 шт.;
- 3) Насадка с капельницей – 1 шт.;
- 4) Инструкция к медицинскому изделию – 1 шт.

LOT 210311-03A



09.2022



**NANO BIO LIFE**
Be a Health Care

AVIVIR



ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Взятие биологических образцов



Взятие мазка (стерильным тампоном из набора)



Взятие мазка (стерильным тампоном из набора)



Взятие слюны

2. Порядок выполнения тестирования




Поместите палочку с образцом/палочку в пробирку с буфером для экспресс-анализа. Выполняйте вертикальные движения палочкой от 10 до 15 раз



Сожмите стенки пробирки для максимального уплотнения жидкости на палочке, извлекая палочку



Вставьте пробирку в лоток прибора или лоток с коллекцией в прибор. Добавьте 3 капли экстракта/образца в лоток

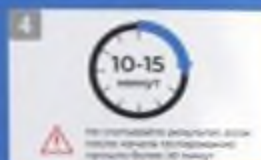

Не оставляйте результат анализа после начала тестирования дольше 10 минут

Считывайте результат тестирования через 10-15 минут

3. Интерпретация результатов



Производитель:
Компания «БиоВектор-Мед»
ООО «БиоВектор-Мед»
СНП, Сосновский мп, Пушкина ст.
СНП, Республика Крым
Многофункциональный
БД, Сосновский мп, Пушкина ст.
СНП, Республика Крым
Телефон: +7 (978) 996-996
Факс: +7 (978) 996-996
www.biovector-med.ru

Представитель дистрибутора
в РФ: ООО «БиоВектор-Мед»
Москва, Мясницкая ул.,
д. 10/1, стр. 1, этаж 27
Тел: +7 (495) 505-30-74

Для профессионального применения


• For *In Vitro* Diagnostic Use

LOT

210311-03A



Sep. 2022

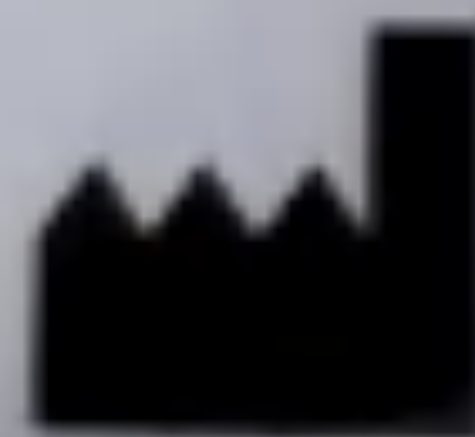

NanoBioLife Inc. 632, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea

TEL +82-2-866-0882 | FAX +82-2-866-3633 | www.nanobiolife.com

Distributed by Gencurix

TEL +82-2-2621-7038 | FAX +82-2-2621-7039 | www.gencurix.com

NANO BIO LIFE
Bio Health Care

GCH GENCURIX


1 Test

NanoCare™

Rapid Test


CE

IVD

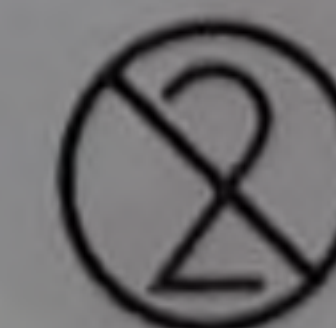

2°C (36°F) 30°C (86°F)



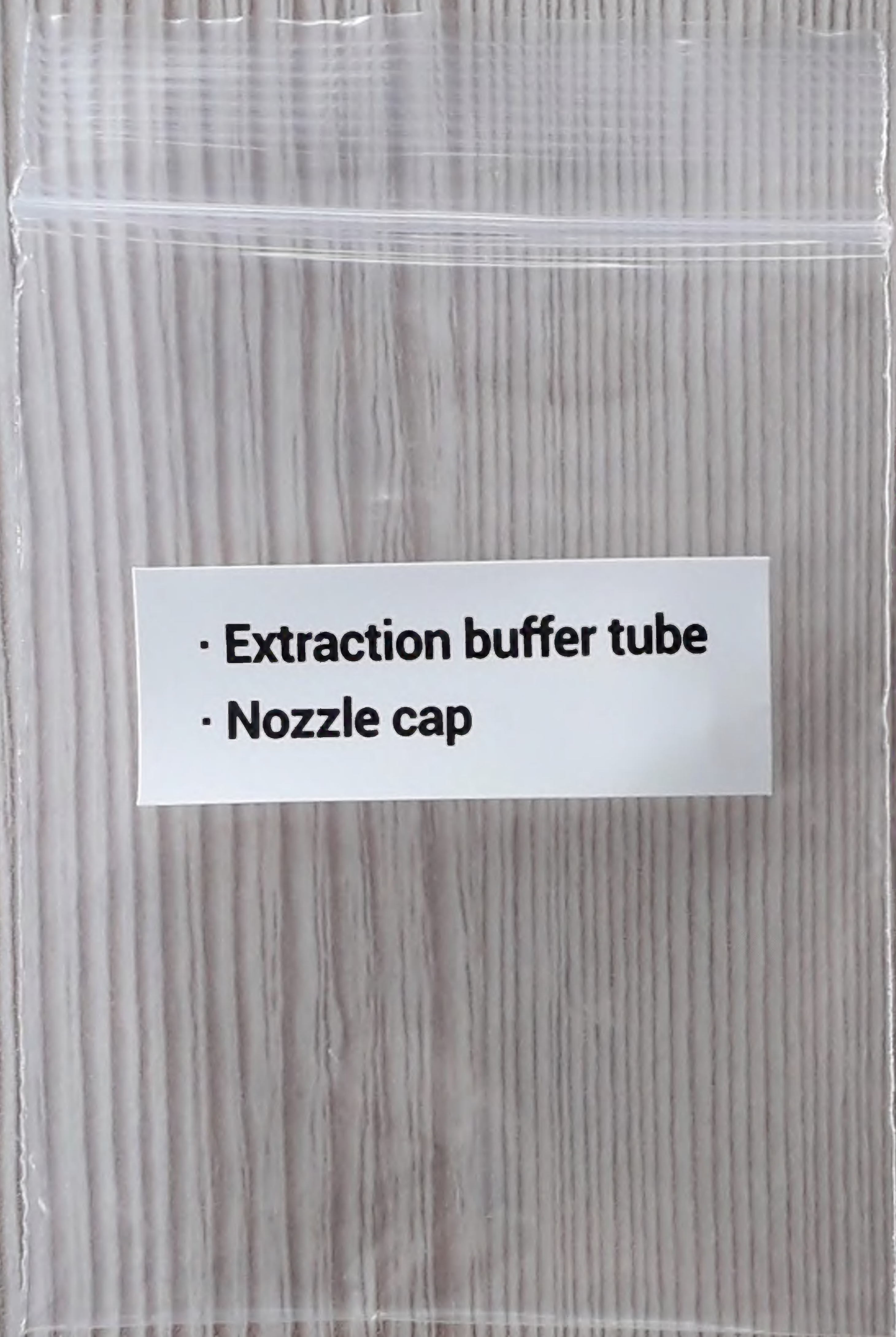

- Extraction buffer tube
- Nozzle cap





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИВИР»

 Куркин Ф.Г.






**Набор реагентов для
иммунохроматографического
выявления антигена SARS-CoV-2
в мазке из носа и носоглотки,
слюне человека (NanoCare COVID-19
Antigen (Ag)). Lot 210311-03A**

СОСТАВ НАБОРА:

- 1) Тестовая кассета – 1 шт.;
- 2) Пробирка с буфером для экстрагирования биологического образца – 1 шт.;
- 3) Насадка с капельницей – 1 шт.;
- 4) Инструкция к медицинскому изделию – 1 шт.

LOT 210311-03A

 09.2022

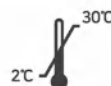



ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ


1. Взятие биологических образцов



Взятие мазка стерильным тампоном из носа




Взятие мазка стерильным тампоном из носоглотки

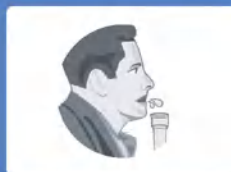


Взятие слюны




2. Порядок выполнения тестирования

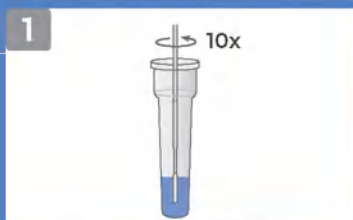


Поместите тампон с образцом/слюну в пробирку с буфером для экстрагирования. Выполняйте вращательные движения тампоном не менее 10 раз

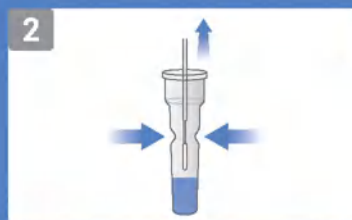

Сожмите стенки пробирки для максимального удаления жидкости из тампона, извлеките тампон

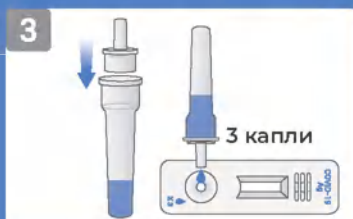

Закройте пробирку, плотно прижав насадку с капельницей к пробирке. Добавьте 3 капли экстрагированного образца.

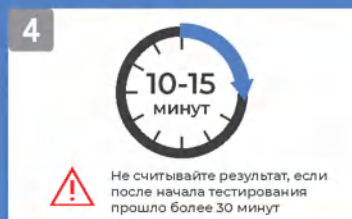

Считывайте результат тестирования через 10–15 минут.



3. Интерпретация результатов



Производитель:
Компания «НаноБиоЛайф Инк.»
(NanoBioLife Inc.)
648, Сеобусает-гил, Геумcheon-гу,
Сеул, Республика Корея
Место производства:
632, Сеобусает-гил, Геумcheon-гу,
Сеул, Республика Корея
Телефон: +82-2-866-0882,
Факс: +82-2-866-3633
www.nanobiolife.com

Представитель производителя
в РФ: ООО «Авивир»
141401, Московская обл.,
г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А,
стр. 1, этаж/пом. 2/7
Тел (495) 925-30-74



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИВИР»

 Куркин Ф.Г.