

Сопроводительное письмо

Cover letter

Мы, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN, направляем следующую эксплуатационную документацию нашему уполномоченному представителю АО «КомплектСервис», 125413, г. Москва, Солнечногорская ул., д. 4, стр. 10, мансарда (доверенность OHQ(CS)-RAF-201079 от 25 Марта 2021) на медицинское изделие: Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Comfort (HEM-7134-E) в Федеральной Службе по Надзору в Сфере Здравоохранения (Росздравнадзор):

- Руководство по эксплуатации на Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Comfort (HEM-7134-E).
- Гарантийный талон на Измеритель артериального давления и частоты пульса торговой марки OMRON.

Настоящим удостоверяем, что представленная документация разработана на русском языке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Достоверность представленной информации подтверждаем.


We, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN submit following operational documents to our authorized representative ComplectService Co Ltd, mansard, bldg. 10, 4 Solnechnogorskaya st., Moscow 125413, Russian Federation (power of attorney OHQ(CS)-RAF-201079 dated March 25, 2021) of a medical device: Automatic Blood Pressure Monitor OMRON M3 Comfort (HEM-7134-E) in the Federal Service for Supervision in the Sphere of Health Care (Roszdravnadzor):

- Instruction manuals for Automatic Blood Pressure Monitor OMRON M3 Comfort (HEM-7134-E).
- Warranty card for Automatic Blood Pressure Monitor trade mark OMRON.

We hereby certify that the submitted documentation developed in Russian language, in accordance with the laws of the Russian Federation.

We confirm the accuracy of the provided information.

August 19, 2021

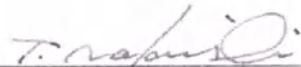
Takefumi Nakanishi
General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地



OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Измеритель
артериального давления
и частоты пульса
торговой марки OMRON**



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании — это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

OMRON

Для HBP-1100 (HBP-1100-E), HBP-1300 (HBP-1300-E), M3 Comfort (HEM-7134-E)
Поверка

Поверка тонометров осуществляется по документу Р 80.2.032-2004 «ГСИ. Измерители артериального давления манжетными. Методика поверки». Интервал между поверками 2 года. Знак утверждения типа наносят на титульный лист руководства по эксплуатации и на гарантийный талон методом печати.

Подтверждение первичной поверки Вы можете найти на сайте: www.smetebel.ru, в виде электронной версии свидетельства о поверке по наименованию, модели и серийному номеру прибора. Оригинал свидетельства находится в АО «КомплектСервис».

Дополнительная информация о поверке подготавливается для всех тонометров из ГТ кроме HBP-1100 (HBP-1100-E), HBP-1300 (HBP-1300-E), M3 Comfort (HEM-7134-E)
Поверка

Поверка тонометров осуществляется по документу МИ 2582-2000 «ГСИ. Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические и полуманжеточные OMRON и MARSHALL. Методика поверки». Интервал между поверками 2 года.

Знак утверждения типа наносят на гарантийный талон или титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Подтверждение первичной поверки Вы можете найти на сайте: www.smetebel.ru, в виде электронной версии свидетельства о поверке по наименованию, модели и серийному номеру прибора. Оригинал свидетельства находится в АО «КомплектСервис».

Дата производства

Дата производства зашифрована в серийном номере или ЛОТ номере, который находится на корпусе прибора и/или товарной упаковке: первые 4 цифры обозначают год производства, следующие 2 цифры – месяц производства.

Дата производства для HBP-1100, 1300

Дата производства зашифрована в номере, который находится на корпусе и товарной упаковке прибора: 4 цифры обозначают год производства. Информация о дате производства так же расположена на последней странице данного гарантийного талона: 4 цифры обозначают год производства, следующие 2 цифры – месяц производства.

Условия транспортирования

Сведения об условиях транспортирования для всей продукции Omron нанесены в виде условного обозначения на индивидуальную товарную упаковку (STORAGE/TRANSPORT CONDITIONS)

Технический ремонт, техническое обслуживание

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно – ни одна из его деталей не предназначена для обслуживания пользователей.

При обнаружении дефектов обращайтесь в центры технического обслуживания OMRON, адреса которых указаны в конце настоящего гарантийного талона.

Приборы не требуют специального технического обслуживания.

OMRON

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. При покупке требуется правильного заполнения гарантийного талона: проставление печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условие гарантии действует в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и не в коей мере не ограничивает права потребителей.

2. Гарантия терять силу в случаях:

- использование прибора с нарушением требований Руководства по эксплуатации;
- при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий потребителей;
- наличия механических или иных повреждений изделия;
- проникновения жидкости, пыли, грязи, посторонних предметов внутрь изделия;
- разборки или любого другого неосторожного вмешательства в конструкцию прибора;
- подключения к электросети через сетевые адаптеры, не рекомендованные фирмой OMRON.

3. Основания гарантии не распространяются на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:

- естественным износом комплектующих и расходных материалов, имеющих ограниченный срок службы (например: конденсаторов, групп для магнетизма воздуха, кабеля USB, адаптеров сетевых, элементов питания и пр.);
- использованием некачественных, выработавших свой ресурс принадлежностей;
- действием непреодолимой силы (молниенный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

4. Базовое комплексное сервисное обслуживание – сервисное обслуживание в течение установленного срока службы изделия, включающего в себя:

- проверку изделия на соответствие техническим параметрам;
- восстановление работоспособности изделия без замены деталей (необходима замена деталей производится за счет потребителя без взимания платы за проводимые работы, за исключением случаев ремонта по гарантии в течение действия гарантийного срока);
- консультации по использованию и хранению изделия.

Срок службы изделия исчисляется с даты покупки изделия.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «Правила для производителей и продавцов изделий и в двенадцатых условиях» входит в Перечень недостоверных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

В соответствии с п. 5 статьи 18 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 «Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора в причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.

OMRON

Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.»



Верной считать нижеизложенную информацию по утилизации прибора и элементов питания:

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации с другими домашними отходами по окончании срока своего срока службы.

Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации для экологически безопасной переработки.

По вопросам утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть батареи для экологически безопасной переработки.

По окончании срока службы изделия, его необходимо утилизировать в соответствии с национальными и региональными нормативными актами.

В медицинских учреждениях, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» изделие подлежит утилизации как изделие класса А согласно требованиям Санитарных правил, предъявляемым к обращению с твердым коммунальным отходам.

OMRON

Модель

HBP-1100 (HBP-1100-E)

HBP-1300 (HBP-1300-E)

Измерители артериального давления и частоты пульса

OMRON испытаны и зарегистрированы в России:

– регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/3196

от 19.10.2015г. Срок действия не ограничен.

– декларация о соответствии: № РОСС JP.ИМ41.Д05910

срок действия от 23.11.2015 до 23.11.2018

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4).

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (EN 1080-1:1996),

ГОСТ 31515.3-2012 (EN 1080-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

– свидетельство об утверждении типа средств измерений

JP.C.39.003.A №59903. Срок действия до 24.09.2020

– декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная

совместимость технических средств»

№ ТС N RU Д-JP.AT19.B.06070. Срок действия до 01.12.2020 г.

Сроки службы и гарантии

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
электронный блок	5 лет	10 лет
манжеты компрессионные	1 год	1 год
воздуховодная трубка	1 год	1 год
аккумуляторный элемент питания	1 год	1 год
адаптер сетевой	2 года	3 года
чехол для манжет	1 год	1 год
воздушная камера для манжет	1 год	1 год

OMRON

Модель M10-IT (HEM-7080IT-E)

Измерители артериального давления и частоты пульса
OMRON испытаны и зарегистрированы в России:
– регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2007/00242
от 18.09.2012 г., срок действия не ограничен.
– декларация о соответствии: РОСС ИР.ИММ1.Д05637
от 22.09.2015 г. Срок действия до: 22.09.2018 г.
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4),
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (EN 1080-1:1996),
ГОСТ 31515.3-2012 (EN 1080-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
– свидетельство об утверждении типа средств измерений:
СН.С.39.035.А № 32705. Срок действия до 12.11.2018 г.
– декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»
№ TC N RU Д-JP.PC52.B.00020 Срок действия до 18.06.2020 г.

Сроки службы и гарантии

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
электронный блок	5 лет	10 лет
манжета	1 год	1 год
адаптер переменного тока	2 года	7 лет
USB – кабель	1 год	1 год
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	

OMRON

**Модель
I-C10 (HEM-7070-E)**

Измерители артериального давления и частоты пульса
OMRON испытаны и зарегистрированы в России:
– регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2009/04075
от 18.09.2012 г., срок действия не ограничен
– декларация о соответствии: РОСС ИР.ИМ41.Д05632
от 22.09.2016 г. Срок действия до: 22.09.2018 г.
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3.4),
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (EN 1080-1:1996),
ГОСТ 31615.3-2012 (EN 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
– свидетельство об утверждении типа средств измерений:
СН.С.39.035.А № 32705. Срок действия до 12.11.2018 г.
– декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»
№ TC N RU Д-JP.PC62.B.00020 Срок действия до 18.05.2020 г.

Сроки службы и гарантии

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
электронный блок	5 лет	10 лет
манжета	1 год	1 год
адаптер переменного тока	2 года	7 лет
USB – кабель	1 год	1 год
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	

OMRON

Модель Mlt Elite (HEM-7300-WE7)

Измерители артериального давления и частоты пульса
OMRON испытаны и зарегистрированы в России:

- регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2008/04078
от 18.08.2012 г., срок действия не ограничен
- декларация о соответствии № РОСС ИР.ИИМ41.Д06638
от 22.09.2015 г. Срок действия до 22.09.2018 г.

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4),
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (EN 1060-1:1996),
ГОСТ Р 31515.3-2012 (EN 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

- свидетельство об утверждении типа средств измерений:
СН.С.39.035.А № 32705. Срок действия до 12.11.2018 г.

- декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»
№ TC N RU Д-IP.PC52.B.00021 Срок действия до 18.05.2020 г.

Сроки службы и гарантии

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
электронный блок	5 лет	5 лет
манжета компрессионная	1 год	1 год
адаптер сетевой	2 года	7 лет
USB – кабель	1 год	1 год
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	

OMRON

**Модель
M1t Elite Plus (HEM-7301-ITKE7)**

Измерители артериального давления и частоты пульса
OMRON испытаны и зарегистрированы в России:

- регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2008/04079
от 18.09.2012 г. Срок действия не ограничен
- декларация о соответствии № РОСС JP.ИМ41.Д05639
от 22.09.2015 г. Срок действия до 22.09.2018 г.

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4),
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (EN 1060-1:1996),
ГОСТ Р 31515.3-2012 (EN 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

- свидетельство об утверждении типа средств измерений:
СН.С.39.035.А № 32705. Срок действия до 12.11.2018 г.

- декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»
№ TC N RU Д-JP.PC52.B.00021. Срок действия до 18.05.2020 г.

Сроки службы и гарантии

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
электронный блок	5 лет	5 лет
манжета компрессионная	1 год	1 год
адаптер переменного тока	2 года	7 лет
USB – кабель	1 год	1 год
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	

OMRON

Модель I-Q132 (HEM-1010-E)

Измерители артериального давления и частоты пульса
OMRON испытаны и зарегистрированы в России:
– регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2008/02444
от 13.08.2012 г. Срок действия не ограничен.
– декларация о соответствии № РОСС.ИР.ИМ41.Д05633
от 22.09.2015 г. Срок действия до 22.09.2018 г.
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4),
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (EN 1060-1:1996),
ГОСТ Р 31515.3-2012 (EN 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
– свидетельство об утверждении типа средств измерений:
СН.С.39.035.А № 32705. Срок действия до 12.11.2018 г.
– декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»
№ ТС N RU Д-JP.PC52.B.00022. Срок действия до 18.05.2020 г.

Сроки службы и гарантии

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
электронный блок	5 лет	5 лет
манжета компрессионная	1 год	1 год
адаптер переменного тока	2 года	7 лет
USB – кабель	1 год	1 год
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	



Модель I-Q142 (HEM-1040-E)

Измерители артериального давления и частоты пульса
OMRON испытаны и зарегистрированы в России:

- регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2008/02445
от 13.06.2012 г. Срок действия не ограничен.
- декларация о соответствии № РОСС ИР.ИМ41.Д06634
от 22.09.2015 г. Срок действия до 22.09.2018 г.
- Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4),
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (EN 1060-1:1996),
ГОСТ Р 31515.3-2012 (EN 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
- свидетельство об утверждении типа средств измерений:
СН.С.38.035.А № 32705. Срок действия до 12.11.2018 г.
- декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»
№ ТС N RU Д-ИР.РС62.В.00022. Срок действия до 18.05.2020 г.

Сроки службы и гарантии

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
электронный блок	5 лет	5 лет
манжета компрессионная	1 год	1 год
адаптер переменного тока	2 года	7 лет
USB – кабель	1 год	1 год
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	

OMRON

Модель M3 Comfort (HEM-7134-E)

Измеритель артериального давления и частоты пульса
автоматический OMRON M3 Comfort (HEM-7134-E)
испытан и зарегистрирован в России:

- регистрационное удостоверение: № РЗН 2017/6022
от 30.07.2019 г. Срок действия не ограничен.
- декларация о соответствии: № РОСС RU Д-JP.МП18.В.01400/19 от
23.08.2019. Срок действия до 23.08.2022.
- Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р.3, 4), ГОСТ Р МЭК
60601-1-2010, ГОСТ 30324.30-2002 (МЭК 60601-2-30:1995), ГОСТ
31515.1-2012 (EN 1060-1:1996), ГОСТ 31515.3-2012 (EN 1060-3:1997).
- свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.39.003.А
№ 74048 от 06.06.2019. Срок действия до 03.06.2024.
- декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств» ЕАЭС № RU Д-JP.НВ09.В.00875/19.
Срок действия до 29.09.2024.

В связи с отменой обязательного оформления деклараций о соответствии с
01.01.2021 г., сведения о декларации и соответствии требованиям ГОСТ, знак
соответствия считать действительными до момента истечения срока
действия декларации.

Сроки службы и гарантии

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
электронный блок	5 лет	5 лет
манжета компрессионная	1 год	1 год
воздуховодная трубка	1 год	1 год
адаптер переменного тока	2 года	7 лет
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	

OMRON

**АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON В РОССИИ**


АО «КомплектСервис» — единственный представитель,
производитель, эксклюзивный дистрибутор и
импортер современной техники OMRON на
территории Российской Федерации

Самый российский
Центр технического
обслуживания в Москве

Адрес и телефоны Центра
технического обслуживания в Москве:
127900, Москва,
Вершининский пер., д. 7, стр. 3
(б. «Милославская»)

Телефоны:
(499) 896-91-82 (многоканальный)
E-mail: service@comet.ru,
omron@comet.ru (сервисный центр)
www.comet.ru

Часы работы Центра технического
обслуживания в Москве:
пн-пт: с 08.30 до 18.00 (без перерыва на обед),
сб: с 10.00 до 18.00 (без перерыва на обед),
вс и праздничные дни — выходные

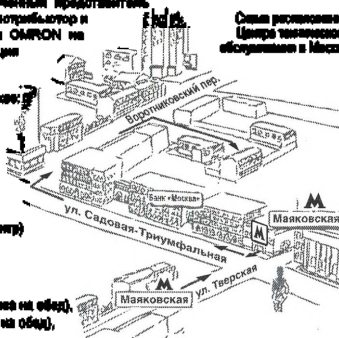

- Архангельск, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
ул. Железнодорожная, д. 13/2, оф. 22,
тел.: (831) 472-69-06, arh@comet.ru
- Астрахань, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
(Котловый), ул. Тополевая, д. 25,
тел.: (8437) 56-242, astr@comet.ru
- Архангельск, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
ул. Дзержинского, д. 63, тел.: (8182)
54-69-56, 20-22-16, arh@comet.ru
- Астрахань, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
ул. Бонная, д. 104, тел.: (8512) 56-56-78,
astr@comet.ru
- Барнаул, ООО «Сибирь Машина Алтай»,
ул. Прима, д. 189Б, тел.: (3852) 54-57-54,
60-36-22, bar@comet.ru
- Белгород, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
ул. Архитектора, д. 54, оф. 11,
тел.: (4722) 42-18-94, bel@comet.ru
- Екатеринбург, ООО «Сибирь Машина Дальний
Восток и Забайкалье» (Хабаровск),
ул. Капитана, д. 100, оф. 215, тел.: (4162)
53-12-33, 53-12-55, ekb@comet.ru
- Брянск, ООО «Сибирь Машина Поволжье», в. Парку,
ул. 25-летия Брестской дивизии, д. 21, тел. 43
тел.: (3083) 26-29-38, brn@comet.ru
- Брянск, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
2-й Советский пер., д. 3, оф. 101,

- тел.: (4832) 37-15-95, 37-15-94,
ekb@comet.ru
- Великий Новгород, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
ул. Мухоморова-Володарова, д. 9,
тел.: (841) 722-15-78, vel@comet.ru
- Владивосток, ООО «Сибирь Машина Дальний
Восток и Забайкалье» (Хабаровск),
ул. Лазо, д. 8, оф. 101, тел.: (4232) 37-65-57,
55-65-20, vld@comet.ru
- Владимир, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
ул. Бурлакова, д. 10А, оф. 8, тел.: (4322)
52-44-47, vld@comet.ru
- Волгоград, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
ул. Заводского, д. 7, оф. 34,
тел.: (8442) 25-94-44, 25-31-14, 24-94-45,
vlg@comet.ru
- Вологда, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
Светлый пер., д. 58, оф. 5,
тел.: (8172) 75-45-75, vlg@comet.ru
- Воронеж, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
ул. Степана Разина, д. 37, оф. 6.1.16,
тел.: (473) 255-08-78, (473) 255-08-78
vor@comet.ru
- Воронеж, ООО «Сибирь Машина Поволжье»,
ул. Степана Разина, д. 37, оф. 6.1.16, тел.: (473) 255-08-78
vor@comet.ru

OMRON

- Екатеринбург, ООО «Сибирская Медиа», ул. Туркестанская, д. 34А, тел.: (343) 222-74-74, info@omron-med.ru
- Саратов, ООО «Сибирская Медиа», ул. 8 Марта, д. 1, оф. 117, тел.: (845) 571-30-54, 571-34-11, sar@omron-med.ru
- Самара, ООО «Сибирская Медиа», ул. Коммунальная, д. 11/2, тел.: (832) 29-08-74, sam@omron-med.ru
- Москва, ООО «Сибирская Медиа» (Москва), ул. 48 лет Победы, д. 112, тел.: (3412) 577-545, 577-464, moscow@omron-med.ru
- Иркутск, ООО «Сибирская Медиа», ул. Дзержинского, д. 79, пом. 34, тел.: (3952) 48-74-74, irk@omron-med.ru
- Нижний Новгород, ООО «Сибирская Медиа-Опт», просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (832) 42-05-01, 42-36-78, nizhny@omron-med.ru
- Казань, ООО «Сибирская Медиа», ул. Чистопольская, д. 61, оф. 18, тел.: (843) 527-61-01, 527-64-43, kaz@omron-med.ru
- Саратов, ООО «Сибирская Медиа», ул. Чистопольская, д. 61, оф. 18, тел.: (843) 529-61-70, sar@omron-med.ru
- Калининград, ООО «Сибирская Медиа-Опт», ул. Мухоморова, д. 40а, оф. 208, 208, тел.: (4912) 30-30-05, kal@omron-med.ru
- Калуга, ООО «Сибирская Медиа», ул. Пятницкая, д. 7, тел.: (4842) 308-308, 308-308, 308-308, (308) 330-54-03, kaluga@omron-med.ru
- Красноярск, ООО «Сибирская Медиа», ул. Свободная, д. 35, оф. 103, тел.: (3943) 59-22-82, 59-24-88, kra@omron-med.ru
- Курск, ООО «Сибирская Медиа», Студенческий пр. д. 16, к. 2, тел.: (3932) 51-35-25, 51-35-35, kursk@omron-med.ru
- Кемерово, ООО «Сибирская Медиа», просп. Марш. д. 51, тел.: (4942) 53-77-75, (4942) 55-35-75, kem@omron-med.ru
- Краснодар, ООО «Сибирская Медиа», ул. Семашко-Польская, д. 6/1, тел.: (861) 235-47-98, 235-47-98, krd@omron-med.ru
- Саратов, ООО «Сибирская Медиа», ул. Коммунальная, д. 11, оф. 17, тел.: (845) 571-30-54, sar@omron-med.ru
- Красноярск, ООО «Сибирская Медиа», ул. Красной Пашины, д. 21, оф. 801, 802, тел.: (391) 221-34-43, 221-30-72, 221-50-84, kra@omron-med.ru
- Пермь, ООО «Сибирская Медиа», ул. Галахова, д. 18, этаж 1, тел.: (342) 74-50-78, 74-50-78, per@omron-med.ru
- Рязань, ООО «Сибирская Медиа», ул. Волчанская, д. 3, тел.: (4742) 55-55-16, (4742) 55-55-12, rya@omron-med.ru
- Магнитогорск, ООО «Сибирская Медиа», ул. Октябрьская, д. 5, тел.: (3518) 25-45-14, mag@omron-med.ru
- Магнитогорск, ООО «Сибирская Медиа», ул. Дзержинского, д. 176, к. 24, тел.: (3722) 55-55-40, mag@omron-med.ru
- Кемерово, ООО «Сибирская Медиа», ул. Коммунальная, д. 106, тел.: (37622) 6-45-91, факс: 6-45-91, kem@omron-med.ru
- Мурманск, ООО «Сибирская Медиа» (Мурманск), просп. Ком. Сов., д. 156, 2 этаж тел.: (3152) 32-33-43, mur@omron-med.ru
- Хабаровск, ООО «Сибирская Медиа», просп. Мухоморова, д. 91, тел.: (3422) 55-44-57, hab@omron-med.ru
- Новокузнецк, ООО «Сибирская Медиа», ул. Хитро-Мухоморова, д. 2, оф. 1, тел.: (390) 573-30-47, моб.: (390) 655-85-01, nkz@omron-med.ru
- Нижний Новгород, ООО «Сибирская Медиа», ул. Горького, д. 46/50, тел.: (831) 434-44-77, 434-30-88, nizhny@omron-med.ru
- Новосибирск, ООО «Сибирская Медиа», ул. Мухоморова, д. 40, тел.: (383) 53-55-18, 48-45-44, nov@omron-med.ru
- Новокузнецк, ООО «Сибирская Медиа» (Новокузнецк), ул. Лавина, д. 5, тел.: (3917) 75-15-01, +7-390-325-15-08, nkz@omron-med.ru
- Новокузнецк, ООО «Сибирская Медиа», ул. Коммунальная, д. 158, тел.: (390) 545-15-11, 545-25-88, nkz@omron-med.ru
- Омск, ООО «Сибирская Медиа», ул. Дзержинского, д. 154, тел.: (3812) 218-308, 381-55-83, omsk@omron-med.ru
- Оренбург, ООО «Сибирская Медиа», ул. Коммунальная, д. 80, тел.: (4662) 54-34-08, oren@omron-med.ru
- Оренбург, ООО «Сибирская Медиа», ул. Целинная, д. 48, оф. 4, тел.: (3532) 404-307, 404-308, oren@omron-med.ru
- Оренбург-Завод, ООО «Сибирская Медиа», ул. Восточная, д. 30а, тел.: (469) 412-54-27, oren@omron-med.ru
- Пенза, ООО «Сибирская Медиа», ул. Коммунальная, д. 98, тел.: (8412) 35-15-57, 35-05-05, pen@omron-med.ru
- Пермь, ООО «Сибирская Медиа», ул. Мухоморова, д. 28, тел.: (342) 224-52-18, 225-57-75, per@omron-med.ru
- Петропавловск, ООО «Сибирская Медиа», ул. Коммунальная, д. 16, оф. 8, тел.: (3142) 55-27-24, pet@omron-med.ru
- Пенза, ООО «Сибирская Медиа», ул. Лавина, д. 16, пом. 1081, тел.: (311) 335-07-46, pen@omron-med.ru

OMRON

- Россия, ООО «Сидо Медика Чувствительность»
(Перевозы), ул. 9 Января, д. 12,
тел.: (47300) 4-52-04,
rosstom@sidomedica.ru
- Россия-на-Дону, ООО «Сидо Медика Россия-на-
(Дон)», ул. Фрунзенская, д. 140,
тел.: (863) 251-03-55 (863) 251-04-06 (863)
251-07-57, rossdon@sidomedica.ru
- Россия, ООО «Сидо Медика Россия»
ул. Савельевская, д. 42, тел.: (4612) 50-04-06,
50-03-10, 50-04-06, ross@sidomedica.ru
- Самара, ООО «Сидо Медика Самара»
ул. Савельевская, д. 198, корпус 1,
офис 308, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-61,
250-31-18, samara@sidomedica.ru
- Саратов-информационный центр
ул. Рязанская, д. 70, стр. 3, оф. 114,
тел.: (845) 257-33-40,
saratov@sidomedica.ru
- Санкт-Петербург, ООО «Сидо Медика
Санкт-Петербург»
ул. Рязанская, д. 70, стр. 3, оф. 114,
тел.: (812) 298-03-30,
spb@sidomedica.ru
- Саратов-информационный центр
Молодежеская ул. пр-кт., д. 36, лит. Н,
тел.: (812) 409-40-00, saratov@sidomedica.ru
- Саратов, ООО «Сидо Медика Саратов»
ул. Вавилова, д. 16, корпус 100, этаж 2,
комната 10222, тел.: (8452) 27-03-34, 22-23-01,
saratov@sidomedica.ru
- Саратов, ООО «Сидо Медика Саратов»
ул. Чкалова, д. 112/124, тел.: (8452) 79-08-05,
79-08-40, saratov@sidomedica.ru
- Симбирск, ООО «Сидо Медика Симбирск»
(И. Никитин), просп. Октябрьский, д. 16,
тел.: (833) 500-70-77,
sz_sib@sid.ru, sz_sib@sid.ru
- Смоленск, ООО «Саранс Медика Юно»,
просп. Победы, д. 54, лит. 87,
тел.: (878) 187-00-05, (878) 410-00-05,
smolensk@sidomedica.ru
- Смоленск, ООО «Сидо Медика Смоленск»
просп. Гагарина, д. 65, тел.: (4812) 35-35-03,
smolensk@sidomedica.ru
- Сочи, ООО «Сидо Медика Кубань» (Краснодар)
Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1,
тел.: (8622) 61-57-05,
sochi@sidomedica.ru
- Ставрополь, ООО «Сидо Медика Ставрополь»
ул. Маршала Жукова, д. 7,
тел.: (8652) 25-38-09, 25-38-06,
stavropol@sidomedica.ru
- Старый Оскол, ООО «Сидо Медика Белгород»
ул. Бугунов, д. 54, тел.: (4726) 24-17-00,
old@sidomedica.ru
- Тула, ООО «Сидо Медика Тула»
ул. Карла Маркса, д. 94, каб. №10,
тел.: (4852) 25-00-17, моб.: (912) 817-41-01
tulay@sidomedica.ru, ssat@sidomedica.ru
- Тольятти, ООО «Сидо Медика Тольятти»
ул. Островная, д. 10, корпус 1,
тел.: (4735) 06-07-10, tolyatti@sidomedica.ru
- Уфа, ООО «Сидо Медика Уфа»
просп. Чкалова, д. 23,
тел.: (4622) 32-00-00, ufa@sidomedica.ru
- Ульяновск, ООО «Сидо Медика Ульяновск»
бульвар Гая, д. 14, оф. 6, тел.: (8452) 74-00-00,
ulyanovsk@sidomedica.ru
- Томск, ООО «Сидо Медика Томск»
ул. Невская, д. 13/1, оф. 104,
тел.: (3822) 802-700, tom@sidomedica.ru
- Тула, ООО «Сидо Медика Тула»
ул. Демократическая, д. 140, тел.: (4872) 36-00-00,
tula@sidomedica.ru
- Тюмень, ООО «Сидо Медика Тюмень»
ул. Халюткина, д. 142, оф. 12,
тел.: (3452) 34-03-70, (3452) 321-00-01,
tyumen@sidomedica.ru
- Улан-Удэ, ООО «Сидо Медика Иркутск»
ул. Троицкий, д. 8, оф. 43,
тел.: (3012) 23-01-01, ulan@sidomedica.ru
- Ульяновск, ООО «Сидо Медика Пензенский»
(И. Никитин), Заводской 5-й, д. 27, оф. 101,
тел.: (8422) 60-77-05, 608-120,
sidomedica@yandex.ru
- Уфа, ООО «Сидо Медика Башкортостан»
ул. Насола Камалов, д. 19,
тел.: (3472) 24-10-05, sidomedica@yandex.ru
- Хабаровск, ООО «Сидо Медика Дальний Восток
и Забайкалье»
ул. Ком-Ю-Това, д. 44/4, оф. 3,
тел.: (4212) 41-13-05,
sidomedica@yandex.ru
- Чебоксары, ООО «Сидо Медика Чебоксары»
ул. Звонкая, д. 28, оф. 107,
тел.: (8362) 36-24-06, 57-03-01,
cheb@sidomedica.ru
- Челябинск, ООО «Сидо Медика Челябинск»
ул. Дзержинского, д. 145, тел.: (351) 237-00-01,
chelyabinsk@sidomedica.ru
- Челябинск, ООО «Сидо Медика Челябинск»
просп. Ломоносова, д. 61, оф. 11,
тел.: (3522) 55-03-03,
sidomedica@yandex.ru
- Чита, ООО «Сидо Медика Дальний Восток
и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чкаловского,
д. 30, оф. 16, тел.: (8052) 02-00-00,
chita@sidomedica.ru
- Шадринск, ООО «Сидо Медика Ростов-на-Дону»
ул. Мухоморова, д. 11/8, тел.: (86362) 6-00-02,
6-00-03, shadrinsk@sidomedica.ru
- Ярославль, ООО «Сидо Медика Ярославль»
ул. Савельевская, д. 44/18,
тел.: (4852) 90-00-03, 20-10-00, 70-11-02
yartom@sidomedica.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ OMEGA

Условные обозначения*

Условные обозначения, знаки, символы и изображения, которые, в зависимости от надписей и надписей, могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации, имеют следующую расшифровку:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Снижение защиты от поражения электрическим током (типично). Рабочая часть типа BF		Ограничение атмосферного давления
	Рабочая часть типа B. Снижение защиты от поражения электрическим током (типично)		Полностью рабочий аппарат
	Индикация класса II. Защита от поражения электрическим током		Для использования только внутри помещений
	Снижение защиты, обозначения оболочки (MKS 0000)		Зеркально-отражающая поверхность покрытия специального назначения (OMRON)
	Знак соответствия директиве ЕС		Минимум совместимых устройств
	Знак соответствия		Минимум для правильного размещения изделия на руке (на левой руке)
	Знак утверждения типа средства измерения		Указание расстояния между точками измерения
	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза		Гарантийная политика производителя
	Порядковый (серийный) номер		Не содержит натуральной латуни
	Код (номер) партии		Знак соответствия требованиям стандарта безопасности
	Температурный диапазон		Срок безопасного использования элемента питания (в годах)
	Диапазон влажности		Подтверждение TÜV
	Технология и качество, Япония		Уровень эффективности энергопотребления
	Технология и качество, Япония		

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Избегать длительного и интенсивного физического exertion		Для обозначения общего повышения уровня радиационного фона или для обозначения наличия радиационного излучения в системах, оборудованных и системах, где используется оборудование, содержащее источник радиационного излучения или оборудование, в котором используется энергия радиоактивного излучения для диагностики и лечения
	Избегать длительного сидения или стояния в неудобной позе		Опасность удара
	Обратиться к руководству по эксплуатации		Питание отключено
	Обратиться к руководству по эксплуатации		Экран имеет подложку переработанной бумаги
	Постоянный ток		
	Переменный ток		
	Диагностика		
	Классификация переработки		

* Таблица содержит максимальное количество условных обозначений, не все из которых могут применяться к Вашему прибору.

Гарантийный талон

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи « _____ » _____ г.

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен,
внешний вид прибора, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя _____

Дата обращения « _____ » _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата прибора потребовалась « _____ » _____ (возврата) _____ г.

Подпись
или штамп мастера

Работу принял
(подпись клиента)

Дата обращения « _____ » _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата прибора потребителя « _____ » _____ (возврата) _____ г.

Подпись _____ Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

Дата обращения « _____ » _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата прибора потребителя « _____ » _____ (возврата) _____ г.

Подпись _____ Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

OMRON

Внимание! При утилизации данного прибора и отработанных элементов питания должны соблюдаться законодательные нормы России касательно отходов электронного оборудования.



Сведения о периодической поверке:

Модель _____

Прибор заводской №: _____

Прошел периодическую поверку

Знак поверки _____



АО «СистемаСервис»
Уполномоченный представитель, производитель, исполнительный дистрибутор и партнер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации

По вопросам реализации и заказов обращаться по адресу:
125413, Москва, ул. Савинковская, д. 4, стр. 10, мансарда
Тел/факс: (495) 967-16-82, 221-73-45 • e-mail: info@csmedica.ru
www.csmedica.ru • csmedica@yandex.ru

По вопросам сервисного обслуживания и консультации
обращаться по адресу:
127004, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Телефон: (495) 966-11-32 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-836-00-80
E-mail: call@csmedica.ru, service@csmedica.ru (сервисный центр)
www.csmedica.ru, csmedica.ru



松本 敬
氏
印

August 1 2021

General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd
Takefumi Nakanishi

Takefumi Nakanishi

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

〒617-0002 京都府 八幡市 藤原町 1-1-1



令和3年	第	492	号	1
認 証 証 書				2
嘱託人中西剛文の代理人藤田恭子は、本日、本公証				3
人の面前において、別紙私署証書における嘱託人の署				4
名を同人に代わり自認した。				5
よって、これを認証する。				6
令和3年8月19日、本公証人役場において。				7
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地の2				8
シカタ ディス ビル5階				9
京都地方法務局所属				10
公証人	天野和生			11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20



公証人役場

nent
o., Ltd



Registered No.492

NOTARIAL CERTIFICATE


This is to certify that Kyoko Fujita, an agent of Takefumi Nakanishi, has stated in my very presence that said Takefumi Nakanishi, has acknowledged himself that signature on the attached document is his own.

Dated this 19th day of Aug. 2021

A M A N O K a z u o

N o t a r y

436-2 Sasayamachi, Oike-sagaru,
Higashinotoin dori, Nakagyo-ku Kyoto
Kyoto District Legal Affairs Bureau

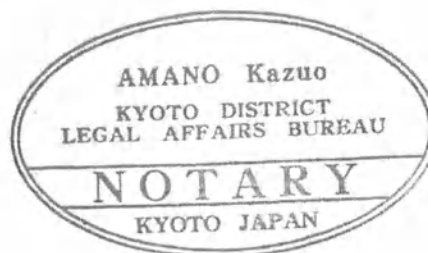

第 6 6 5 号

証 明

この認証の付与は、在職中の公証人がその権限に基づいてしたものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

令和 3 年 8 月 1 9 日

京都地方法務局長 西 田 正 延



Registration No.665

CERTIFICATE

This is to certify that the annexed Notarial Certificate has been executed by Notary, duly authorized and practising in Kyoto , Japan , and that the Official seal appearing on the same is genuine.

Date 2021.8.19

NISHIDA Masanobu

Director of the Kyoto District Legal Affairs Bureau

Перевод с английского языка на русский язык

ОМРОН (OMRON)
№: OHQ(CS)-RAF-210503

19 августа 2021 года

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)
53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

19 августа 2021 года

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что Киоко Фудзита, агент Такефуми Наканиси, подтвердил в моем присутствии, что указанный Такефуми Наканиси подтвердил подлинность своей подписи, проставленной в прилагаемом документе.

Дата: сегодня, 19 августа 2021 года

[подпись]

Кацуо Аmano

Нотариус

436-2 Сасаямачи, Ойке-сагару,

Хигашинотоин дори, Накагио-ку Киото

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

[Печать:

Кацуо Аmano

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

НОТАРИУС

КИОТО, ЯПОНИЯ]

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что прилагаемое Нотариальное свидетельство было оформлено Нотариусом, надлежащим образом уполномоченным и осуществляющим свою деятельность в Киото, Япония, а также, что Официальная печать, проставленная на данном документе, является подлинной.

Дата: 19.8.2021 г.

НИСИДА Масанобу

Директор Регионального бюро по юридическим вопросам, Киото

Перевод данного текста выполнен переводчиком Алексеевым Алексеем Александровичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва.

Двадцать пятого августа две тысячи двадцать первого года.

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы, Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Алексеева Алексея Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2021- 42-2039

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Л. В. Дейнеко

Гербовая печать
нотариуса г.
Москвы
Прокошенковой Е.Е.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью __31__ лист(-а,-ов).

ПОДПИСЬ

Л. В. Дейнеко

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого августа две тысячи двадцать первого года
Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая
обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены
Евгеньевны, свидетельствую верность копии с представленного мне
документа.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2021- 42-2040
Уплачено за совершение нотариального действия: 1920 руб. 00
коп.

Л. В. Дейнеко



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью __31__ лист(а) (ов)

Врио нотариуса

Л. В. Дейнеко

КОПИЯ

OMRON

OHQ(CS)-RAF-210501

Сопроводительное письмо

Cover letter

Мы, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN, направляем следующую эксплуатационную документацию нашему уполномоченному представителю АО «КомплектСервис», 125413, г. Москва, Солнечногорская ул., д. 4, стр. 10, мансарда (доверенность OHQ(CS)-RAF-201079 от 25 Марта 2021) на медицинское изделие: Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Comfort (HEM-7134-ALRU) в Федеральной Службе по Надзору в Сфере Здравоохранения (Росздравнадзор):

- Руководство по эксплуатации на Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Comfort (HEM-7134-ALRU)
- Гарантийный талон на Измеритель артериального давления и частоты пульса торговой марки OMRON

Настоящим удостоверяем, что представленная документация разработана на русском языке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Достоверность представленной информации подтверждаем.


We, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN submit following operational documents to our authorized representative ComplectService Co Ltd, mansard, bldg. 10, 4 Solnechnogorskaya st., Moscow 125413, Russian Federation (power of attorney OHQ(CS)-RAF-201079 dated March 25, 2021), of a medical device: Automatic Blood Pressure Monitor OMRON M3 Comfort (HEM-7134-ALRU) in the Federal Service for Supervision in the Sphere of Health Care (Roszdravnadzor):

- Instruction manuals for Automatic Blood Pressure Monitor OMRON M3 Comfort (HEM-7134-ALRU).
- Warranty card for Automatic Blood Pressure Monitor trade mark OMRON.

We hereby certify that the submitted documentation developed in Russian language, in accordance with the laws of the Russian Federation.

We confirm the accuracy of the provided information.

August 19, 2021

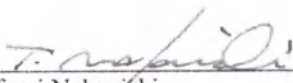
Takefumi Nakaniishi
General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

All for Healthcare

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

M3 Comfort (HEM-7134-ALRU)
Руководство по эксплуатации

IM-HEM-7134-ALRU-03-07/2021
4603108-BC

Введение

Благодарим за покупку прибора OMRON M3 Comfort для измерения артериального давления на плече.

OMRON M3 Comfort — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осцилометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Круг пользователей

Данное устройство предназначено для измерения давления у взрослых с соответствующей данной манжетой длиной окружности плеча.

Назначение

Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжетой длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения.

Сфера применения

Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях. **Обстоятельства при которых следует проконсультироваться с врачом** OMRON рекомендует всегда консультироваться с медицинским специалистом перед началом использования домашнего медицинского оборудования. Самостоятельная постановка диагноза и самолечение без должного профессионального медицинского надзора может привести к неправильному или неполному диагнозу и/или к неправильной дозировке лекарственных средств. В случае если результаты измерения или эффект от лечения не совпадают с ожиданиями, OMRON рекомендует проконсультироваться в медицинским специалистом.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем использовать прибор в одном из следующих состояний пациента: общая аритмия (например, предсердная или желудочковая экстрасистола, мерцательная аритмия), артериосклероз, недостаточная перфузия, диабет, преклонный возраст, беременность, преддиабетизация и почечная недостаточность. Обратите внимание, что на показания прибора могут повлиять движения или дрожь ПАЦИЕНТА.

Используйте прибор только для измерения артериального давления. Не используйте только манжету на плечо, предназначенную для этого прибора. Использование других манжет может привести к некорректным результатам измерения.

При измерении убедитесь, что на расстоянии 30 см от прибора нет сотовых телефонов или других электрических устройств, излучающих электромагнитные волны. Это может нарушать работу изделия и/или приводить к неточному измерению.

Если Вы подвергались мастэктомии, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием устройства. Если рядом с результатом измерения отображается индикатор нерегулярного сердцебиения, рекомендуется обратиться к врачу за консультацией. Следуйте указаниям своего врача.

Показания к применению

Данный продукт может быть использован для контроля артериального давления и частоты пульса с целью подтверждения эффективности лечения или применения программ по улучшению образа жизни. Данный продукт может быть использован для отслеживания этих параметров в домашних условиях.

Противопоказания

Данный продукт не должен быть использован, в случае если место наложения манжеты травмировано или повреждено или применяется другая терапия, препятствующая правильному использованию прибора. Данный продукт не должен быть использован, если пациент находится в состоянии повышенного нервного возбуждения, так как результаты измерения не будут отражать актуальные значения артериального давления.

Не надевайте манжетку во время использования капелек/цы или при переливании крови.

Не используйте этот прибор для измерения давления у детей и лиц, не отвечающих за свои действия.

Побочные эффекты

- Не выполняйте измерения чаще, чем это требуется. Это может привести к образованию синяков в результате нарушения кровообращения.
- Нагнетание большого давления, чем требуется может привести к образованию синяков на плече в месте наложения манжеты.
- При раздражении кожи или других проблемах прекратите использовать прибор и обратитесь к лечащему врачу.

Технический ремонт

Помимо замены элементов питания (где применимо) и присоединения рекомендуемых аксессуаров (перечислены в руководстве по эксплуатации) вследствие их износа, никакие другие вмешательства в конструкцию прибора не допускаются. В случае обнаружения дефекта,

свяжитесь с официальным дистрибьютором данного продукта. Данные об официальном дистрибьюторе должны быть указаны на упаковке изделия, в гарантийном талоне или в руководстве по эксплуатации.

Для Вашей безопасности неукоснительно выполняйте инструкции, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем. **ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ** относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

Важная информация по безопасности

⚠ Предупреждение! Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или тяжелым травмам.

(Общее применение)

⚠ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** самостоятельно назначать себе лечение на основе результатов, полученных при помощи этого прибора для измерения артериального давления. Принимайте препараты в соответствии с назначениями лечащего врача. Только квалифицированный врач может ставить диагноз и лечить гипертонию.

⚠ Проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем использовать прибор в одном из следующих состояний пациента: общая аритмия (например, предсердная или желудочковая экстрасистола, мерцательная аритмия), артериосклероз, недостаточная перфузия, диабет, преклонный возраст, беременность, преддиабетизация и почечная недостаточность. Обратите внимание, что на показания прибора могут повлиять движения или дрожь ПАЦИЕНТА.

⚠ Не используйте прибор на руке, если она травмирована или если осуществляется ее лечение.

⚠ При раздражении кожи или других проблемах прекратите использовать прибор и обратитесь к лечащему врачу.

⚠ Не надевайте манжетку во время использования капелек/цы или при переливании крови.

⚠ Перед использованием прибора на руке с артериовенозным шунтом проконсультируйтесь с лечащим врачом.

⚠ Не используйте прибор одновременно с другим медицинским электрооборудованием. Это может нарушать работу прибора и/или приводить к неточному измерению.

⚠ Не используйте прибор вблизи высокочастотного хирургического оборудования, МРТ- или КТ-сканеров или же в среде, богатой кислородом. Это может нарушать работу прибора и/или приводить к неточному измерению.

⚠ Воздуховодная трубка или кабель адаптера переменного тока могут стать причиной случайного удущения младенцев.

⚠ Прибор содержит мелкие детали, которые при их проглатывании младенцем могут стать причиной удушья.

(Использование адаптера переменного тока)
⚠ Не пользуйтесь адаптером переменного тока при повреждении прибора или сетевого шнура. Немедленно отключите питание и извлеките сетевой шнур из розетки.

⚠ Включайте адаптер переменного тока только в розетку с соответствующим напряжением и не прикасайтесь к розетке с разведенными пальцами.

⚠ Запрещается вставлять сетевой шнур в розетку и вынимать его мокрыми руками.

⚠ **Внимание!** Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней тяжести, а также к повреждению оборудования или другого имущества.

(Общее применение)

⚠ Всегда консультируйтесь с лечащим врачом. Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны.

⚠ Люди с серьезными нарушениями кровообращения или другими заболеваниями крови перед использованием устройства необходимо проконсультироваться с врачом, так как нагнетание воздуха в манжетку может привести к образованию синяков.

⚠ Если манжетка не начинает сдуваться во время измерения, снимите ее.

⚠ Не используйте этот прибор для измерения давления у детей и лиц, не отвечающих за свои действия.

⚠ Используйте прибор только для измерения артериального давления. Не используйте только манжету на плечо, предназначенную для этого прибора. Использование других манжет может привести к некорректным результатам измерения.

⚠ При измерении убедитесь, что на расстоянии 30 см от прибора нет сотовых телефонов или других электрических устройств, излучающих электромагнитные волны. Это может нарушать работу изделия и/или приводить к неточному измерению.

⚠ Не разбирайте электронный блок и манжетку. В противном случае это может привести к неточности показаний.

⚠ Не используйте в местах наличия влаги или в таких местах, где на прибор могут попасть капли воды. Это может привести к повреждению прибора.

⚠ Не используйте прибор в движущемся транспортном средстве (автомобиль, самолет).

⚠ Не выполняйте большее количество измерений, чем требуется. Это может привести к образованию синяков в результате нарушения кровообращения. Если Вы подвергались мастэктомии, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием устройства.

⚠ Если систолическое давление превышает 210 мм рт. ст., прочитайте раздел «Если систолическое давление выше 210 мм рт. ст.» в этом руководстве по эксплуатации. Нагнетание большого давления, чем требуется, может привести к образованию синяков в месте наложения манжеты.

(Использование адаптера переменного тока)

⚠ Полностью вставляйте штекер адаптера переменного тока в розетку. Не тяните за сетевой шнур при отсоединении штекера адаптера переменного тока от розетки. Аккуратно извлекайте штекер адаптера переменного тока.

⚠ Соблюдайте следующие указания при обращении с сетевым шнуром:

- Не допускайте повреждения шнура.
- Не ломайте его.
- Не сгибайте и не тяните его с усилием.
- Не разбирайте его.
- Не связывайте его в узел во время использования.
- Не защемляйте его.
- Не ставьте на него тяжелые предметы.

⚠ Удаляйте пыль со штекера адаптера переменного тока.

⚠ Отключайте электронный блок от розетки, когда он не используется.

⚠ Отключайте штекер адаптера переменного тока перед очисткой.

⚠ Используйте только адаптер переменного тока OMRON, предназначенный для этого прибора. При работе с другими адаптерами возможно повреждение и/или выход прибора из строя.

(Использование элементов питания)

⚠ При установке элементов питания обязательно соблюдайте полярность.

⚠ Для этого прибора используйте только 4 щелочных или марганцевых элемента питания типа «AA». Не используйте элементы питания другого типа. Не используйте новые и старые элементы питания вместе.

⚠ Если прибор не предполагается использовать в течение трех или более месяцев, извлеките из него элементы питания.

⚠ Используйте элемент питания в течение рекомендованного времени, которое указано на нем.

Общие меры предосторожности

- Не сгибайте манжету с усилием и не перегибайте воздуховодную трубку.
- Выполняя измерения, не перегибайте и не переувлажняйте воздуховодную трубку. Это может привести к опасной травме вследствие нарушения кровообращения.
- При отсоединении воздушного штекера следует тянуть за штекер в месте соединения с основным устройством, а не за саму трубку.
- Не подвергайте прибор и манжету сильным ударам или вибрациям, не роняйте их на пол.
- Не нагнетайте воздух в манжетку, если она не обернута вокруг плеча.
- Используйте прибор только в указанных условиях окружающей среды. В противном случае это может привести к неточности показаний.
- Прочитайте рекомендации подраздела «Безопасная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)» в разделе «7. Электромагнитная совместимость» и следуйте им.
- Прочитайте рекомендации подраздела «Надлежащая утилизация прибора» в разделе «6. Технические характеристики» и следуйте им при утилизации прибора и используемых с ним принадлежностей или дополнительных запасных частей.
- Убедитесь, что прибор не вызывает у ПАЦИЕНТА продолжительного нарушения кровообращения (например, набухшая за конечностью, на которой выполняется измерение).
- Если прибор хранится при максимальной или минимальной температуре хранения и транспортировки, а затем помещается в среду с температурой 20 °С, рекомендуется подождать около 2 часов перед использованием прибора.

1. Общие сведения о приборе


Комплект поставки:

Электронный блок, манжетка компрессионная HEM-FL31, адаптер переменного тока NHR-CM01, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

Электронный блок:



Манжетка компрессионная:

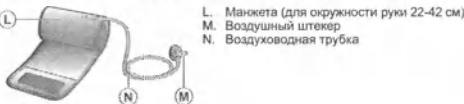

Дисплей:



1.1 Символы на дисплее:

Индикатор нерегулярного сердцебиения (⚡)

Если прибор обнаруживает нерегулярный ритм не менее двух раз за время измерения, на дисплее рядом со значениями измерения отображается индикатор нерегулярного сердцебиения. Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25 % отличается от среднего ритма, определенного при измерении систолического и диастолического артериального давления.

Если рядом с результатом измерения отображается индикатор нерегулярного сердцебиения, рекомендуется обратиться к врачу за консультацией. Следуйте указаниям своего врача.

Индикатор движения (👤)

Индикатор движения отображается, если во время измерения Вы двигались. Снимите манжетку и подождите 2–3 минуты. Измерьте давление заново, стараясь не двигаться во время измерения.

Пиктограмма среднего значения (📊)

Пиктограмма среднего значения отображается при нажатии и удержании кнопки памяти более 3 секунд. На дисплее отображается последнее среднее значение.

Световой индикатор правильной фиксации манжеты (🟢)

Если манжетка наложена на руку недостаточно плотно, результаты измерения могут быть неточными. В этом случае световой индикатор правильной фиксации манжеты не загорится. При правильной фиксации манжеты индикатор 🟢 загорится зеленым цветом. Данная функция используется для определения необходимой плотности прилегания манжеты к руке.

Графический индикатор уровня артериального давления (цветовой)

Если значения систолического и диастолического давления превышают стандартный диапазон (135 мм рт. ст. для систолического и/или 85 мм рт. ст. для диастолического артериального давления), то при отображении результатов измерения индикатор артериального давления (цветовой) загорится оранжевым. Если значения находятся в пределах стандартного диапазона, индикатор не загорится.

В соответствии с рекомендациями JNC 7* необходимо придерживаться следующих указаний.

	Общие рекомендации относительно артериального давления	
	Предгипертония при измерении в кабинете врача	Гипертония при измерении дома
Систолическое артериальное давление	120–139 мм рт. ст.	135 мм рт. ст.
Диастолическое артериальное давление	80–89 мм рт. ст.	85 мм рт. ст.

Это имеет статистическую ценность для мониторинга артериального давления.

* JNC 7 — Седьмой доклад Объединенного Национального Комитета по предупреждению, распознаванию, оценке и лечению повышенного артериального давления (Декабрь, 2003г.).

1.2 Перед измерением


Для получения точных результатов выполняйте следующие указания.

- В течение 30 минут до измерения нельзя принимать еду/жидку, пить алкогольные напитки или кофе, курить, выполнять физические упражнения или принимать душ.
- Перед измерением необходимо отдохнуть не менее 5 минут.
- Стресс способствует повышению артериального давления. Не выполняйте измерение во время стресса.
- Измерения необходимо выполнять в тихом месте.
- Снимите с руки плотно прилегающую одежду.
- Не забудьте записать показания артериального давления и частоты пульса, чтобы показать их затем лечащему врачу. Однократное измерение не позволяет получить точное значение артериального давления. Используйте дневник артериального давления для записи показаний в течение некоторого времени. Чтобы загрузить файлы PDF дневника, посетите веб-сайт www.omron-healthcare.com.

2. Подготовка к работе

2.1 Установка элементов питания

- Снимите крышку отсека для элементов питания.

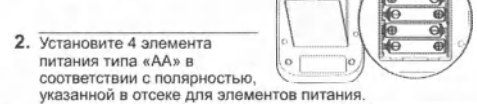

- Установите 4 элемента питания типа «AA» в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для элементов питания.

Примечания:

- Если на дисплее появился индикатор разряда элементов питания (🔋), выключите прибор и извлеките все элементы питания. Заменяйте 4 элемента питания одновременно. Рекомендуется использовать долговечные щелочные элементы питания.
- Значения результатов измерений остаются в памяти даже после замены элементов питания.
- Элементы питания из комплекта поставки могут иметь более короткий срок эксплуатации.

⚠ Элементы питания следует утилизировать в соответствии с государственными/местными правилами по утилизации элементов питания.

2.2 Использование адаптера переменного тока

Примечание: убедитесь, что для подключения и отключения адаптера переменного тока используется легкодоступная сетевая розетка.

1. Вставьте штекер адаптера переменного тока в гнездо для адаптера,

- Вставьте штекер адаптера переменного тока в гнездо для адаптера, расположенного на задней части электронного блока.

- Включите адаптер переменного тока в электрическую розетку.

Чтобы отсоединить адаптер переменного тока, сначала отсоедините его от электрической розетки, а затем отсоедините штекер адаптера от электронного блока.


2.3 Установка даты и времени

Перед первым измерением установите в тонометре нужную дату и время.

1. Нажмите кнопку 🗓.

2. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы установить год.

Нажмите кнопку 🗓, чтобы подтвердить год, после чего замигают значения месяца. Выполните те же шаги, чтобы изменить месяц, день, часы и минуты.

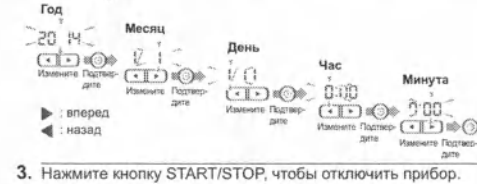

Примечания:

- При замене элементов питания в приборе происходит сброс установок даты и времени, поэтому впоследствии нужно заново установить дату и время.
- Если дата и время не установлены, во время или после измерения будет отображаться индикация «--».

3. Использование прибора

3.1 Наложение манжеты на плечо

Снимите с левого плеча плотно прилегающую одежду или плотно закатанный рукав.

Не накладывайте манжетку поверх плотной одежды.

- Плотно вставьте воздушный штекер в воздушное гнездо.



- Наложите манжетку на верхнюю часть левой руки.



Нижний край манжеты должен находиться на 1–2 см выше локтя. Манжетка должна накладываться на плечо воздуховодной трубкой в сторону запястья.



- Убедитесь, что тканевая застежка-липучка застегнута.



Примечания:

- При измерении давления на правой руке воздуховодная трубка будет проходить сбоку от локтя. Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать рукой воздуховодную трубку.
- Артериальное давление на правой руке и левой руке может быть разным, также могут различаться и его измеренные значения. Компания OMRON рекомендует всегда измерять давление на одной и той же руке. В случае существенного различия между значениями на разных руках необходимо обратиться к врачу и определить, на какой руке следует проводить измерения.

3.2 Правильная поза при измерении

Артериальное давление следует измерять в тихой, спокойной обстановке в положении сидя при комфортной комнатной температуре.

- Сядьте на стул так, чтобы ноги не были скрещены, а ступни полностью соприкасались с полом.
- Сядьте так, чтобы Ваша спина и рука опирались на что-либо.
- Манжету следует разместить на руке на уровне сердца.



3.3 Выполнение измерений

Примечания:

- Для прекращения измерения нажмите кнопку START/STOP, чтобы выпустить воздух из манжеты.
- Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения.

Прибор выполняет измерения и хранит в памяти результаты для 2 пользователей, которым присваиваются ИДЕНТИФИКАТОРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1 и 2.

- Выберите ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (1 или 2).

2. Нажмите кнопку START/STOP.

Манжетка начнет автоматически наполняться воздухом.



Если систолическое давление выше 210 мм рт. ст.
После того, как началось автоматическое наполнение манжеты воздухом, нажмите и удерживайте кнопку START/STOP до тех пор, пока прибор не поднимет давление до значения, превышающего ожидаемое систолическое давление на 30–40 мм рт. ст.

Примечания:

- Тонометр не нагнетает давление свыше 299 мм рт. ст.
- Не нагнетайте большое давление, чем требуется.

3. Расстегните застежку и снимите манжетку.

- Нажмите кнопку START/STOP, чтобы отключить прибор. Прибор автоматически сохранит результат измерения в памяти. Прибор автоматически выключается через 2 минуты.

Примечание: Перед повторным измерением необходимо подождать 2–3 минуты. За это время артерии возвращаются в то состояние, в котором они находились до измерения давления.

Работа в гостевом режиме

Значения результатов измерений сохраняются в памяти тонометра для 2 пользователей. Гостевой режим используется для измерения артериального давления у другого лица. В гостевом режиме результаты измерений не сохраняются в памяти.

- Нажмите и удерживайте кнопку START/STOP более 3 секунд. Значок ИДЕНТИФИКАТОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и дисплей даты/времени исчезнут.

- Отпустите кнопку START/STOP, когда дисплей даты/времени отключится. Манжетка начнет автоматически наполняться воздухом.

⚠ Всегда консультируйтесь с лечащим врачом. Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны.

3.4 Использование функции памяти

Прибор автоматически сохраняет результаты до 60 измерений для каждого пользователя (1 и 2). Кроме того, он вычислит среднее значение на основе 3-х последних значений измерений, полученных в течение 10 минут.

Примечания:

- Если память содержит только 2 значения измерений за этот период времени, то среднее значение будет рассчитано на основе этих 2-х значений.
- Если за этот период времени в памяти содержится 1 значение измерения, оно будет отображаться в качестве среднего значения.
- При переполнении памяти прибор будет удалять более старые значения.
- При просмотре значений измерений, выполненных без установленной даты и времени, на дисплее вместо даты и времени отображается индикация «--».

Просмотр хранящихся в памяти значений измерений

1. Выберите ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (1 или 2).

- Нажмите кнопку 🗓. В течение секунды отображается номер памяти, а затем отображается частота пульса. Самый последний результат обозначен цифрой «1».

Примечание: Вместе со значениями измерений на дисплее отображается индикатор правильной фиксации манжеты. При этом световой индикатор фиксации манжеты на панели не загорится. 🟢: манжетка на руке закреплена достаточно плотно. 🟡: манжетка на руке закреплена недостаточно плотно или наложена неправильно.

3. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы просмотреть сохраненные в памяти значения.

◀: для просмотра более старых значений
▶: для просмотра более новых значений

Просмотр среднего значения

1. Выберите ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (1 или 2).

4. Сообщения об ошибках и устранение неисправностей

4.1 Сообщения об ошибках

Условие обозначения ошибки	Причина	Способ решения
	Обнаружен нерегулярный пульс.	Расслабьте застёжку и снимите манжету. Подождите 2–3 минуты и выполните еще одно измерение. Повторите шаги, указанные в разделе 3.3. При повторном возникновении этой ошибки обратитесь к лечащему врачу.
	Движения во время измерения.	Внимательно прочитайте и повторите шаги, описанные в разделе 3.3.
	Манжета закреплена недостаточно плотно.	Наложите манжету плотнее. Обратитесь к разделу 3.1.
	Низкий уровень заряда элементов питания.	Рекомендуется заменить элементы питания заранее. Обратитесь к разделу 2.1.
	Элементы питания разряжены.	Немедленно замените 4 элемента питания. Обратитесь к разделу 2.1.
	Воздушный штекер не подсоединен.	Плотно вставьте штекер. Обратитесь к разделу 3.1.
	Манжета закреплена недостаточно плотно.	Наложите манжету плотнее. Обратитесь к разделу 3.1.
	Утечка воздуха из манжеты.	Замените манжету новой. Обратитесь к разделу 5.3.
	Движение во время измерения; манжета недостаточно накачена.	Повторите измерение. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Движение во время измерения; манжета недостаточно накачена.	Если символ «E2» появляется неоднократно, следует вручную нагнать воздух в манжету до тех пор, пока давление не поднимется на 30–40 мм рт. ст. выше предыдущего значения измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Манжета была накачана с превышением максимально допустимого давления, что вызвало автоматический выпуск воздуха из манжеты.	Не прикасайтесь к манжете и/или не перегибайте воздуховодную трубку во время измерения. Не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Движение во время измерения.	Повторите измерение. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения.
	Движение во время измерения.	Обратитесь к разделу 3.3.
	Манжете мешает одежда на плече.	Снимите одежду, мешающую манжете. Обратитесь к разделу 3.1.
	Ошибка прибора.	Свяжитесь с центром технического обслуживания изданий торговой марки OMRON.

Изделие не подлежит специальному техническому обслуживанию.

4.2 Поиск и устранение неисправностей

Если во время измерения возникает любая неполадка, указанная ниже, прежде всего убедитесь, что на расстоянии 30 см от прибора нет других электрических устройств. Если проблему устранить не удастся, см. таблицу ниже.


Проблема	Причина	Способ решения
Результат измерения слишком высокий (или низкий).	Манжета закреплена недостаточно плотно. Движение или разговор во время измерения. Манжете мешает одежда на плече.	Наложите манжету плотнее. Обратитесь к разделу 3.1. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3. Снимите одежду, мешающую манжете. Обратитесь к разделу 3.1.
Давление в манжете не повышается.	Воздуховодная трубка не плотно подсоединена к воздушному гнезду. Утечка воздуха из манжеты.	Надежно подсоединена к воздушному блоку. Обратитесь к разделу 3.1. Замените манжету на новую. Обратитесь к разделу 5.3.
Манжета сдувается слишком быстро.	Манжета наложена на плечо слишком свободно.	Наложите манжету правильно, чтобы она плотно облегла руку. Обратитесь к разделу 3.1.
Не удается выполнить измерение, или результаты слишком низкие или слишком высокие.	Манжета недостаточно накачена.	Поднимите давление в манжете на 30–40 мм рт. ст. выше предыдущего значения измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
При нажатии на кнопку ничего не происходит.	Элементы питания разряжены. Элементы питания установлены неправильно.	Замените 4 элемента питания новыми. Обратитесь к разделу 2.1. Вставьте элементы питания, соблюдая правильную полярность (+/-). Обратитесь к разделу 2.1.
Другие неисправности.	• Нажмите кнопку START/STOP и повторите измерение. • Замените элементы питания новыми. Если проблема не была устранена, обратитесь к Вашему дистрибьютору продукции компании OMRON.	

5. Уход и хранение

5.1 Уход

Соблюдайте следующие правила для защиты прибора от повреждений:

- Храните прибор и его компоненты в чистом и безопасном месте.
- Не используйте абразивные или легко испаряющиеся чистящие средства.
- Не мойте прибор и какие-либо его компоненты, и не погружайте их в воду.
- Не используйте бензин, разбавители и растворители для очистки прибора.

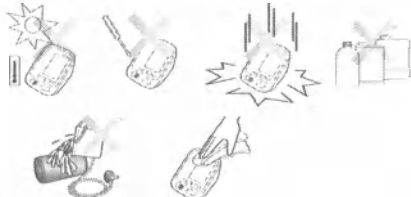

- Используйте мягкую и сухую ткань или мягкую и смоченную нейтральным мылом ткань для очистки прибора и манжеты.
- Внесение в прибор изменений или модификаций, не одобренных производителем, приведет к аннулированию гарантии. Не разбирайте прибор или его компоненты и не пытайтесь осуществить их ремонт. Свяжитесь с уполномоченным техническим центром или дистрибьютором OMRON.
- Техническое обслуживание. Изделие не подлежит специальному техническому обслуживанию.

Калибровка и обслуживание

- Точность данного прибора для измерения артериального давления была тщательно проверена и сохраняется в течение длительного времени.
- Рекомендуется проверять точность измерения и правильность работы прибора каждые 2 года. Свяжитесь с уполномоченным техническим центром или дистрибьютором OMRON.

5.2 Хранение

Храните прибор чехле, когда он не используется.


1. Отсоедините воздушный штекер от воздушного гнезда.
 2. Аккуратно сложите воздуховодную трубку внутри манжеты.
- Примечание: Не перегибайте и не мните воздуховодную трубку слишком сильно.



Прибор запрещается хранить в следующих условиях:

- если на прибор попала влага или он намок;
- если место хранения подвержено воздействию высоких температур, влажности, действию прямых солнечных лучей, пыли или едких паров, таких как хлорная известь;
- если место хранения подвержено действию вибрации, ударов или является наклонной поверхностью.

5.3 Дополнительные принадлежности (в рамках Директивы ЕС об изделиях для медицинского применения 93/42/EEC)

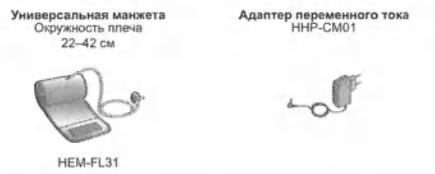

6. Технические характеристики

Наименование	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON
Модель	M3 Comfort (HEM-7134-ALRU)
Дисплей	Цифровой ЖК-дисплей
Метод измерения	Осциллометрический
Диапазон давления в манжете	от 0 до 299 мм рт. ст.
Диапазон измерений давления воздуха в манжете	от 20 до 280 мм рт. ст.
Диапазон измерений частоты	от 40 до 180 1/мин
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете	±3 мм рт. ст.
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты пульса	±5 %
Компрессия	Автоматическая, с помощью воздушного электрического компрессора, управляемого системой неформальной логики
Декомпрессия	Клапан автоматического сброса давления
Память	60 измерений с датой и временем для каждого пользователя (1 и 2)
Параметры источника питания	Постоянный ток: 6 В, 4 Вт (DC6V)

Источники питания

Срок службы: электронный блок манжета адаптер переменного тока	5 лет 1 год 5 лет
Срок службы элементов питания	Прибл. 1000 измерений (при использовании новых щелочных элементов питания)
Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки)	Тип BF (манжета)
Защита от поражения электрическим током	Класс II (при работе от адаптера переменного тока) Медицинское оборудование с внутренним источником питания (при работе от элемента питания) IP20

Классификация IP Электронный блок "Классификация IP - это степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529). Защита от проникновения объектов диаметром 12,5 мм, например, пальцы рук или более крупные объекты. Классификация IP Адаптер переменного тока "Классификация IP - это степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529). Защита от проникновения объектов диаметром 12,5 мм, например, пальцы рук или более крупные объекты. Защита от проникновения вертикально падающих капель воды.	IP21
---	------

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха относительная влажность атмосферное давление	от +10 до +40 °C (от 50 до 104 °F) от 15 до 90 % (без конденсации) от 700 до 1060 гПа
Условия хранения и транспортирования: температура окружающего воздуха относительная влажность атмосферное давление	от -20 до +60 °C (от -4 до 140 °F) от 10 до 95 % (без конденсации) от 700 до 1060 гПа
Масса: электронный блок манжета адаптер переменного тока	не более 330 г (без элементов питания) не более 163 г не более 48 г
Габаритные размеры: электронный блок манжета адаптер переменного тока	не более 107 x 79 x 141 мм (Ш x в x Г) не более 532 x 18 x 145 мм (Ш x в x Г) не более 22 x 56,2 x 66 мм (Ш x в x Г)
Длина сетевого шнура адаптера переменного тока	не более 154 см
Манжета: окружность плеча	от 22 до 42 см

Материал манжеты/трубки
Комплект поставки
Нейлон, полиэстер, поливинилхлорид
Электронный блок, манжета компрессионная диагностическое артериального давления в фазе 5 принимало участие HNP-CM01, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

- Примечания:
- В ходе клинического валидационного исследования для определения диагностического артериального давления в фазе 5 принимало участие 85 человек.
 - Данное устройство прошло клинические исследования согласно требованиям ISO 81060-2:2013 (исключая беременных женщин и пациентов с преэклампсией).
 - Этот прибор можно использовать для непрерывной работы.

CE0197

- Данный прибор удовлетворяет требованиям директивы ЕС 93/42/EEC (Директива по медицинским приборам).
- Данный прибор для измерения артериального давления спроектирован в соответствии с европейским стандартом EN1060 «Ненавязанные сфигмоманометры», часть 1 «Общие требования» и часть 3 «Дополнительные требования для электромеханических систем измерения артериального давления».
- Данное изделие OMRON изготовлено в условиях применения системы строгого контроля качества компании OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Япония. Датчик давления — главный компонент приборов для измерения артериального давления компании OMRON — изготавливается в Японии.

Применимые стандарты

EN ISO 15223-1:2016 EN ISO 1041:2008 EN 1060-1:1995+A2:2009 EN 1060-3:1997+A2:2009 EN 60601-1:2006+A1:2013 EN 60601-1-2:2015 EN 60601-1-6:2010+A1:2015 EN 60601-1-11:2015 EN 60601-2-30:2010+A1:2015 EN 62364:2006+A1:2015 EN 62366:2008+A1:2015 EN ISO 10993-1:2009/AC:2010 EN ISO 10993-5:2009	EN ISO 10993-10:2013 EN ISO 14971:2012 EN ISO 81060-2:2014 EN ISO 13485:2016 EN 50581:2012
--	--

Расшифровка условных обозначений, значков, символов и пиктограмм, которые, в зависимости от изделия и модели, могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации

	Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки). Рабочая часть типа BF
	Изделие класса II Защита от поражения электрическим током
IP XX	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529)
CE	Знак соответствия директиве ЕС

	Знак соответствия
	Знак утверждения типа средства измерения
	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза
	Порядковый (серийный) номер
	Код (номер) партии
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Ограничение атмосферного давления
	Поперность разъема адаптера
	Для использования только внутри помещений
	Зарегистрированная технология измерения артериального давления OMRON
	Манжеты совместимые с устройством
	Метка для правильного расположения манжеты на левой руке
	Указатель расположения плечевой артерии
	Указатель диапазона и расположения плечевой артерии
	Гарантийная пломба производителя
	Не содержит натуральный латекс
	Указатель диапазона окружности плеча для помощи в подборе правильного размера манжеты.
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Постоянный ток
	Переменный ток
	Дата изготовления
	Технология и качество, Япония
	Технология и дизайн, Япония
	Окружность плеча
	OMRON connect — приложение для загрузки данных измерений на интеллектуальное устройство.

Дата производства зашифрована в серийном номере, который находится на корпусе прибора и/или товарной упаковке: первые 4 цифры обозначают год производства, следующие 2 цифры — месяц производства.

App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
iPhone является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
Android и Google Play являются товарными знаками Google LLC.

Надлежащая утилизация прибора (обработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отнесите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с местным торговым представителем, у которого был приобретен прибор, или же с местным органом власти для получения подробной информации о том, куда и как можно вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям надлежит связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный прибор не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы изделия, его необходимо утилизировать в соответствии с национальными и региональными нормативными актами.

В медицинских учреждениях, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» изделие подлежит утилизации как изделие класса А согласно требованиям Санитарных правил, предъявляемым к обращению с твердым коммунальным отходам.

Измерители артериального давления и частоты пульса OMRON испытаны и зарегистрированы в России:
— регистрационное удостоверение: № P3Н 2017/6022 от 30.07.2019. Срок действия не ограничен.
— декларация о соответствии: № PCCC RU Д-JP.MP18.B.01400/19 от 23.08.2019. Срок действия до 23.08.2022.
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (п.3.4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2:2010, ГОСТ 30324-20-2002 (МЭК 60601-2-30:1995), ГОСТ 31515-1-2012 (EN 1060-1:1996), ГОСТ 31515-3-2012 (EN 1060-3:1997), —свидетельство об утверждении типа средств измерений О.С.С.39.003.А № 74048 от 06.06.2019. Срок действия до 03.06.2024.
—декларация о соответствии TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС № RU Д-JP.HB09.B.00875/19. Срок действия до 29.09.2024.
В связи с отменой обязательного оформления деклараций о соответствии с 01.01.2021 г., сведения о декларации и соответствии требованиям ГОСТ, знак соответствия считать действительными до момента истечения срока действия декларации.

ПОВЕРКА

Проверка осуществляется по методике поверки Р 1323565.2.001-2018. Междоверочный интервал 2 года.
Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографическим способом.
Согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» результаты поверки подтверждаются сведениями о результатах поверки, включенными в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Подтверждение прохождения процедуры поверки Вы также можете найти на сайте: www.csmedica.ru по наименованию, модели и серийному номеру прибора.

7. Электромагнитная совместимость

Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС) Прибор M3 Comfort (HEM-7134-ALRU), произведенный компанией OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., удовлетворяет требованиям стандарта EN60601-1-2:2015 относительно электромагнитной совместимости (ЭМС). Тем не менее, следует соблюдать специальные меры предосторожности:
• Использование вспомогательных принадлежностей и кабелей, отличных от указанных или поставленных компанией OMRON, может привести к увеличению электромагнитного излучения или уменьшению электромагнитной устойчивости устройства и вызвать неполадки в его работе.
• Во время измерения не следует использовать устройство рядом с другим устройством или поверх него, поскольку это может привести к неполадкам в работе. Если подобное использование необходимо, за этим устройством и другим устройством следует наблюдать и проверять правильность их работы.
• Во время измерения портативные радиочастотные средства связи (включая такие периферийные устройства, как кабели антенн и внешние антенны) должны использоваться не ближе 30 см от любой части устройства, включая кабели, указанные компанией OMRON. Невыполнение этого требования может привести к ухудшению работы устройства.
• Ниже см. дальнейшее указание относительно среды ЭМС, в которой следует использовать устройство.

Таблица 1. Нормы и соответствие ИЗЛУЧЕНИЯ

Признак	Нормы на ИЗЛУЧЕНИЕ	Соответствие
Кондуктивное и эмиссионное РЧ-ИЗЛУЧЕНИЕ	CISPR 11	Группа 1, класс В
Кондукционное и эмиссионное РЧ-ИЗЛУЧЕНИЕ	См. IEC 61000-3-3	Соответствие

Таблица 2. УРОВНИ ТЕСТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Признак	Основной стандарт ЭМС	УРОВНИ ТЕСТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
Электростатический разряд	IEC 61000-4-2	Контактный: +8 кВ Воздушный: ±2 кВ, ±4 кВ, ±6 кВ, ±15 кВ для порта корпуса
Излучаемые радиочастотные электромагнитные поля	IEC 61000-4-3	10 Вм 80 МГц — 2,7 ГГц 80 % АМ на частоте 1 кГц для порта корпуса
Поля в ближней зоне, излучаемые РЧ-оборудованием беспроводной связи	IEC 61000-4-3	См. таблицу 3
Устойчивость к наносекундным электрическим импульсным помехам	IEC 61000-4-4	±2 кВ для входного порта питания переменного тока 100 Гц частота повторения импульсов
Выбросы между двумя линиями проводниками в точке сети	IEC 61000-4-5	±0,5 кВ ±1 кВ для входного порта питания переменного тока
Кондуктивные помехи, вызываемые РЧ-полями	IEC 61000-4-6	3 В ср. кв. знч. 150 ГГц — 80 МГц 6 В ср. кв. знч. в диапазоне частот ISM и любительской радиосвязи между 150 кГц и 80 МГц 80 % АМ на частоте 1 кГц для входного порта питания переменного тока
Магнитные поля с номинальной частотой питающей сети	IEC 61000-4-8	30 А/м 50 Гц и 60 Гц для порта корпуса
Падения напряжения	IEC 61000-4-11	0 % UТ: 0,5 цикла при 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° и 315° для входного порта питания переменного тока 0 % UТ: 1 цикл и 70 % UТ: 25/30 однофазных циклов: при 0° для входного порта питания переменного тока
Прерывания напряжения	IEC 61000-4-11	0 % UТ: 250/300 циклов для входного порта питания переменного тока

Примечание. UТ представляет собой напряжение переменного тока до применения контрольного уровня.

Таблица 3. Характеристики теста УСТОЙЧИВОСТИ ПОРТА КОРПУСА к беспроводному устройству радиочастотной связи

Частота теста (МГц)	Диапазон частот (МГц)	Обслуживание	Модуляция	Максимальная мощность (Вт)	Расстояние (м)	УРОВЕНЬ ТЕСТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ (В/м)
385	380—390	TETRA 400	Импульсная модуляция 18 Гц	1,8	0,3	27
450	430—470	GMR5 460, FRS 460	FM отклонение ± 5 кГц, синусоидальный сигнал: 1 кГц	2	0,3	28
710	704—787	Диапазон частот LTE 13, 17	Импульсная модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9
810	800—960	GSM 800/900, TETRA 800, GSM 850, Диапазон частот LTE 5	Импульсная модуляция 18 Гц	2	0,3	28
1720	1700—1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, Диапазон частот LTE 1, 3, 4, 25, UMTS	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0,3	28
2450	2400—2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Диапазон частот LTE 7	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0,3	28
5240	5100—5800	WLAN 802.11 a/n	Импульсная модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9

В тесты ЭМС включается адаптер переменного тока, поставляемый с этим изделием.

8. Некоторая полезная информация об артериальном давлении

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление — это показатель давления потока крови на стенки артерий. Артериальное давление постоянно меняется в цикле сокращения сердца. Самое высокое давление на протяжении сердечного цикла называется «систолическим артериальным давлением»; самое низкое — «диастолическим артериальным давлением». Для оценки состояния артериального давления пациенту врачу необходимы оба значения: систолическое и диастолическое.

Что такое аритмия?

Аритмия — это состояние, когда ритм сердцебиения нарушен из-за сбоев в биоэлектрической системе, управляющей сердцебиением. Ее типичными признаками являются выдающиеся сокращения сердца, преждевременные сокращения, необычно частый (тахикардия) или редкий (брадикардия) пульс.

Почему хорошо иметь возможность измерять артериальное давление дома?

На артериальное давление могут влиять многие факторы, такие как физическая активность, беспокойство или время суток. Для постановки точного диагноза одного измерения может быть недостаточно.

Для получения точных данных лучше всего измерять артериальное давление ежедневно в одно и то же время. Обычно утром артериальное давление ниже, а во второй половине дня оно повышается. Давление ниже летом и выше зимой.

Как гипертензия связана с консультатом?

Гипертензия (высокое артериальное давление) представляет собой основной фактор риска инсульта. Установлено, что при эффективном лечении пациентов, страдающих артериальной гипертензией, удается предотвратить 1 из 4 геморрагических инсультов (нефатальных внутримозговых кровоизлияний). В указаниях по гипертензии, помимо измерений в кабинете врача, рекомендуется измерять артериальное давление дома, поскольку это способствует более эффективному лечению.

Ссылки на медицинские отчеты, упомянутые выше, доступны по запросу.

Производитель	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (OMRON ХЭЛСХЭА Ко., Лтд.) 53, Kunohsbo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN (53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 JAPONIA)
Представитель в ЕС	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (OMRON ХЭЛСХЭА ЕВРОПА Б.В.) Scorpheus 33, 2132 LR Wooldrich, THE NETHERLANDS (Scorpheus 33, 2132 ЛР Вульфдорп, НИДЕРЛАНДЫ) (www.omron-healthcare.com)
Производственное подразделение	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. (OMRON ХЭЛСХЭА МАНУФАКТУРИНГ ВЬЕТНАМ КО., ЛТД.) No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam (No.28 BСMII II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam)
Уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации	АО «КомплектСервис» 125413, г. Москва, ул. Солнечнаягорская, д. 4, стр. 10, мансарда www.csmedica.ru Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

Сделано во Вьетнаме



OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Измеритель
артериального давления
и частоты пульса
торговой марки OMRON**



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

OC-BPM-PL-03-042018
8800261-4C

Срок гарантии на электронный блок – 5 лет**Бесплатное послепродажное сервисное обслуживание*****ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ**

1. При покупке требуйте правильного заполнения гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни в коем мере не ограничивают права потребителей.
 2. Гарантия теряет силу в случаях:
 - использовании прибора с нарушением требований Руководства по эксплуатации;
 - при ущербе и результате умалчивания или ошибочных действий потребителя;
 - наличии механических или иных повреждений изделия;
 - проникновении влаги, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
 - разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию прибора;
 - подключения к электросети через сетевые адаптеры, не рекомендованные фирмой OMRON.
 3. Основная гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом комплектующих и расходных материалов, имеющих ограниченный срок службы (манометр компрессионный, грузы для нагнетания воздуха, кабели USB, адаптеры сетевых, элементы питания и пр.);
 - использованием некачественных, неадаптированных к своему ресурсу принадлежностей;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).
- * Бесплатное послепродажное сервисное обслуживание – сервисное обслуживание в течение установленного срока службы изделия, включающее в себя:
- проверку изделия на соответствие техническим параметрам;
 - восстановление работоспособности изделия без замены деталей (необходимость замены деталей проводится за счет потребителя без взимания платы за проводимые работы, за исключением случаев ремонта по гарантии в течение действия гарантийного срока);
 - консультации по использованию и хранению изделия.
- Срок службы изделия исчисляется с даты покупки изделия.

Срок службы электронного блока – 10 лет.

В зависимости от модели, в состав манжетного артериального давления могут входить следующие комплектующие и (или) расходные материалы:

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
манжета компрессионная	1 год	1 год
грузы для нагнетания воздуха	1 год	1 год
кабели USB	1 год	1 год
адаптер сетевой	2 года	7 лет
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях...» входит в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

В соответствии с п. 5 статьи 18 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 «Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.

Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.»

Техническое обслуживание и гарантий ремонт

Надenna не подлежит специальному техническому обслуживанию. Запрещается самостоятельно ремонтировать надenna, при обнаружении неисправностей необходимо обратиться в центр технического обслуживания.

Гарантийный талон

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи « ____ » _____ г.

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен,
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получен

Подпись покупателя _____

Дата обращения « ____ » _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю « ____ » _____ г.

Подпись _____ Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

Дата обращения «_____» _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю «_____» _____ г.

Подпись _____ Работу принял _____
или печать мастера (подпись клиента)

Дата обращения «_____» _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю «_____» _____ г.

Подпись _____ Работу принял _____
или печать мастера (подпись клиента)



- Арамзас, ООО «СисМедика Поволжье»,
ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22,
тел.: (831) 472-96-05, ariz_cs@bpb.ru
- Армавиру, ООО «СисМедика Кубань»
(Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26,
тел.: (86137) 58-202, cs_mediam@mail.ru
- Архангельск, ООО «СисМедика
Поморье», ул. Северодвинская, д. 63,
тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10,
pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СисМедика Астрахань»
ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78,
astrahan@csmedica.ru
- Барнаулу, ООО «СисМедика Алтай»,
ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54,
60-30-22, cs-barناول@mail.ru
- Белгороду, ООО «СисМедика Белгород»,
ул. Архиперская, д. 2А, оф. 11,
тел.: (4722) 42-12-94,
belgoorod@csmedica.ru

- Благоевщенин, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЗс Медика Иркутск», с. Падун, ул. 25-летия Братскзастроя, д. 21, пом. 43, тел.: (3953) 36-29-28, csmedica@bk.ru
- Брянск, ООО «СиЗс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Валуйки Новгород, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Мерехова-Волосова, д. 9, тел.: (915) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101,

OMRON

тел.: (4232) 37-00-57, 80-80-26,
samedica-0@mail.ru

• Владимир, ООО «Сиб Медика Владимир»,
ул. Сунцова, д. 10А, оф. 8, тел.: (4922)
52-84-47, samedica-vladimir@mail.ru

• Волгоград, ООО «Сиб Медика Нижний
Волга», ул. Завенского, д. 7,
тел.: (8442) 28-84-44, 28-81-14, 24-34-40,
samedica34@mail.ru

• Вологда, ООО «Сиб Медика Вологда»,
Осветный просп., д. 80, оф. 5,
тел.: (8172) 75-45-78, samedica@volgda.ru

• Воронеж, ООО «Сиб Медика Черноземье»,
ул. Степана Разина, д. 37, тел.: (473)
232-09-68 volpash@samedica.vrn.ru

• Екатеринбург, Офис ООО «Сиб Медика
Урал», ул. Турганова, д. 30А, тел.: (343)
222-74-75, med@samedica-ural.ru

Саранско-консультационный центр,
ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117,
тел.: (343) 371-36-84, 371-34-11,
sardica@samedica-ural.ru

• Иваново, ООО «Сиб Медика Иваново»,
ул. Колосова, д. 11/2, тел.: (4932) 28-08-74,
samedica-ivanovo@mail.ru

• Ижевск, ООО «Сиб Медика Вятка»
(Ижевск), ул. 40 лет Победы, д. 122,
тел.: (3412) 377-645, 377-684,
samedica18@mail.ru

• Иркутск, ООО «Сиб Медика Иркутск»,
ул. Дзугаева, д. 78, пом. 30,
тел.: (3952) 48-74-74 office39@samedica.ru

• Йошкар-Ола, ООО «Сиб Медика Йошкар-
Ола», просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (8362)
42-66-81, 42-26-73, samedica1-ol.ru

• Казань, ООО «Сиб Медика Казань»,
ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)
527-51-05, 527-84-48, sisk@mail.ru

• Калининград, ООО «Сиб Медика
Калининград», ул. Нарская,
д. 49а, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65,
kalinin@mail.samedica.ru

• Калуга, ООО «Сиб Медика Калуга»,
ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 908-909,

595-099, 908-999, (908) 638-80-80,
samedica_kaluga@mail.ru

• Кемерово, ООО «Сиб Медика Кемерово»,
ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842)
59-22-02, 65-74-80, siskn_ru@mail.ru

• Курск, ООО «Сиб Медика Вятка»,
Студенческий пр., д. 18, к. 2, тел.: (3932)
51-36-25, 51-36-50, vutka@samedica.ru

• Кострома, ООО «Сиб Медика Иваново»,
просп. Мира, д. 51, тел.: (4942) 55-28-73,
samedica-ivanovo@mail.ru

• Красноярск, Офис ООО «Сиб Медика
Кубань», ул. Свободы, д. 871,
тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90,
kub@mail.samedica.ru

Саранско-консультационный центр,
ул. Свободы, д. 871, оф. 17,
тел.: (861) 238-47-05, sardica23@samedica.ru

• Красноярск, ООО «Сиб Медика Енисей»,
ул. Красный Гвардии, д. 21, оф. 601, 602,
тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-80-06,
info@samedicaenisey.ru

• Курск, ООО «Сиб Медика Курск»,
ул. Гайдара, д. 18, этаж 1,
тел.: (4712) 74-06-78, 74-00-79,
samedica-kursk@yandex.ru

• Липецк, ООО «Сиб Медика Липецк»,
ул. Политехническая, д. 3,
тел.: (4742) 25-09-18, (4742) 25-00-12,
lipetsk@samedica.ru

• Магнитогорск, ООО «Сиб Медика
Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9,
тел.: (3519) 29-48-14, mgn@samedica-ural.ru

• Москва, ООО «Сиб Медика
Москва», ул. Давыдовского,
д. 17б, к. 24, тел.: (8722) 55-85-40,
samedica1@mail.ru

• Минеральные Воды, ООО «Сиб Медика
Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106,
тел.: (87822) 6-02-51, факс: 6-00-48,
samedica-min@mail.ru

• Мурманск, ООО «Сиб Медика Мурманск»
(Петровск), проспект Кельский, д. 186,
2 этаж, тел.: (8152) 52-63-43,
murmansk@samedica.ru

OMRON

- Набережные Челны, ООО «СиЗс Медика Казань», просп. Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СиЗс Медика Югра», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, тел.: (908) 873-30-47, моб.: (902) 855-85-01, cstymen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЗс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СиЗс Медика Новокузнецк», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (3843) 60-05-18, 46-46-44 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новороссийск, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Революции 1905 года, д. 65, тел.: (8617) 64-32-51, cs_medicanov@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СиЗс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-16-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СиЗс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, direktor55@csmedica.ru
- Орёл, ООО «СиЗс Медика Орёл», ул. Латышских стрелков, д. 6, тел.: (4862) 307-127, ore@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЗс Медика Оренбург», ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 4, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЗс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (496) 412-64-27, csprodmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЗс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЗс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЗс Медика Карелия», ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, помещ. 1001, тел.: (911) 885-07-56, csmedica.pskov@yandex.ru
- Росошь, ООО «СиЗс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЗс Медика Рязань», ул. Семёна Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЗс Медика Самара», ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1, оф. 306, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, csmedica-samara@sama.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114, тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», Малодетское сельский просп., д. 36, лит. Н, тел.: (812) 309-09-80, csnw@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетское сельский просп., д. 36, лит. Н, тел.: (812) 715-88-93, spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЗс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЗс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmsaratov@mail.ru
- Саров, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18,

OMRON

тел.: (950) 360-70-77,
ar2_cs1@bk.ru, ar2_cs@bk.ru

- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», просп. Победы, д. 54, пом. 37, тел.: (978) 137-90-68, (910) 416-59-55, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЗс Медика Смоленск», просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-88, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЗс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СиЗс Медика Белгород», ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЗс Медика Югра», ул. Малик-Карамова, д. 64, каб. №10, тел.: (3462) 25-46-17, моб.: (912) 817-41-41 cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru
- Тамбов, ООО «СиЗс Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, помещ. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЗс Медика Тверь», просп. Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЗс Медика Самара», бульвар Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, csmedica-tilt@yandex.ru
- Томск, ООО «СиЗс Медика Томск», ул. Нахимова, д. 13/1, оф. 104, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЗс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЗс Медика Тюмень», ул. Холодильная, д. 142, оф. 12,

тел.: (3452) 34-22-70, (932) 321-46-21, cstyumen@mail.ru

- Улан-Удэ, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Терешковой, д. 6, оф. 43, тел.: (3012) 23-01-61, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЗс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (3472) 34-18-08, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/II, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica-amur@yandex.ru
- Чебоксары, ООО «СиЗс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЗс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chei@csmedica-ural.ru
- Череповец, ООО «СиЗс Медика Вологда», просп. Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63, csmedicacherepovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЗс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 90-66-53, 20-12-50, 73-11-82 yaroslavl@csmedica.ru

OMRON

Внимание! При утилизации данного прибора и отработанных элементов питания должны соблюдаться законодательные нормы России касательно отходов электронного оборудования.



Сведения о периодической поверке:

Модель _____

Прибор заводской №: _____

Прошел периодическую поверку

Знак поверки _____



АО «КомпэлтСервис»
Уполномоченный представитель, производитель, эксклюзивный
дистрибутор и импортер медицинских тонометров OMRON на территории
Российской Федерации

По вопросам реализации и запросов обращаться по адресу:
125413, Москва, ул. Сетунговская, д. 4, стр. 10, этаж 4
Телефон: (495) 997-18-92, 221-73-45 • e-mail: info@csmedica.ru
www.csmedica.ru • csmedica.ru

По вопросам сервисного обслуживания и консультаций обращаться:
127006, Москва, Воронцовский пер., д. 7, стр. 3
Телефон: (499) 595-11-32 (многоканальный) • e-mail: cs-servicepart@mail.ru
www.cs-servicepart.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-99

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ OMEGA

Условные обозначения*

Условные обозначения, значки, символы и пиктограммы, которые в зависимости от модели и модификации, могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации, имеют стандартно раскраску:

	Станция защиты от поражения электрическим током (ток утечки). Рабочая часть типа BF
	Изделие класса II Защита от поражения электрическим током
IPXX	Станция защиты, обеспечивающая оболочкой (МЭК 60529)
CE	Знак соответствия директиве ЕС
	Знак соответствия
	Знак утверждения типа средства измерения
EAC	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза
SN	Порядковый (серийный) номер
LOT	Код (номер) партии
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Ограничение атмосферного давления

* Таблица содержит максимальное количество условных обозначений, не все из которых могут применяться к Вашему прибору.

	Питание отключено
	Полнота резинки адаптера
	Для использования только внутри помещений
	Зарегистрированная технология измерения артериального давления OMRON
	Манжеты совместимые с устройством
	Метка для правильного расположения манжеты на левой руке
	Указатель расположения плечевой артерии
	Указатель диаметра и расположения плечевой артерии
	Указатель положения и направления выравнивания относительно плечевой артерии
	Гарантийная пломба производителя
	Не содержит натуральный латекс
	Указатель диаметра окружности плеча для помощи в подборе правильного размера манжеты
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

	Постоянный ток
	Переменный ток
	Дата изготовления
	Технология и качество, Япония
	Технология и дизайн, Япония
	Для обозначения общего повышения уровня потенциально опасного неионизирующего излучения или для маркировки оборудования и систем, например, в помещениях, где установлено медицинское электрическое оборудование, являющееся источником радиочастотного излучения, в котором используется энергия радиочастотного излучения для диагностики и лечения
	Оружие руки
	Оружие запястья
	Элемент питания подлежит вторичной переработке
	Срок безопасного использования элемента питания (в годах)
	Клинически подтверждено
	Отметка завода изготовителя о проверке

Сведения об условиях транспортирования для всей продукции OTCop нанесены в виде условного обозначения на индивидуальную товарную упаковку (STORAGE/TRANSPORT CONDITIONS).

Информацию в руководствах по эксплуатации о периодичной проверке на заводе-изготовителе и о нанесении поверительного клейма на корпус прибора или в гарантийный талон считать необязательной.

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации или в гарантийный талон типовой формы.

Подтверждение легитимности вы можете найти на сайте: www.sota-bis.ru, в виде электронной версии свидетельства о поверке по наименованию, модели и серийному номеру прибора. Оригиналы свидетельства находятся в ЗАО «КомплектСервис».

[illegible][illegible][illegible]

№2 Вакс (ВЕН-77101-1109). Регистрационное удостоверение ФГС 2012/21210 от 12.06.2012.
Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии ГОСТ Р 51945.01.1143.
Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии ГОСТ Р 51945.01.1143.
ГОСТ Р 51945.01.1143. Декларация о соответствии ГОСТ Р 51945.01.1143. Части 2, 4.
ГОСТ Р 50897-2006. ГОСТ 31515-2012. ГОСТ 31516-2012. ГОСТ 31517-2012. Декларация о соответствии ГОСТ Р 50897-2006. ГОСТ 31515-2012. ГОСТ 31516-2012. ГОСТ 31517-2012. Декларация о соответствии ГОСТ Р 50897-2006. ГОСТ 31515-2012. ГОСТ 31516-2012. ГОСТ 31517-2012. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Законотомиями совместности технических средств» Т.С.Н.Р.Д. № П082.000005. Срок действия не ограничен.
Согласен с тем, что продукция не является опасной № 46964 от 28.06.2012.

302 Байт (ИЕМ-7118-ИД). Регистрационное удостоверение ФСЗ 2006/04434 от 13.08.2012.
Срок действия не ограничен. Действующий в соответствии с РосЗД № 1441.05635.

Срок действия до 22.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (п. 3.4), ГОСТ Р МЭК 60901-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (ЕН 1080-1:1998), ГОСТ 31515.3-2012 (ЕН 1080-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60901-1-3-2014. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТС N RU Д-П.РСБ2.В.00033. Срок действия до 20.06.2020. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 32706 от 20.11.2013.

М2 Вебо (М2В-7118-МВ). Регистрационное удостоверение ФCS 2009/04434 от 13.08.2012. Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС ИР М441.006936. Срок действия до 22.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (п. 3.4), ГОСТ Р МЭК 60901-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (ЕН 1080-1:1998), ГОСТ 31515.3-2012 (ЕН 1080-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60901-1-3-2014. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТС N RU Д-П.РСБ2.В.00033. Срок действия до 20.06.2020. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 32705 от 20.11.2013.

М2 Клава (М2К-7117-МВ). Регистрационное удостоверение ФCS 2009/04435 от 13.08.2012. Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС ИР М441.006936. Срок действия до 22.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (п. 3.4), ГОСТ Р МЭК 60901-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (ЕН 1080-1:1998), ГОСТ 31515.3-2012 (ЕН 1080-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60901-1-3-2014. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТС N RU Д-П.РСБ2.В.00033. Срок действия до 20.06.2020. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 32705 от 20.11.2013.

М2 Клава (М2К-7117-МВ). Регистрационное удостоверение ФCS 2009/04435 от 13.08.2012. Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС ИР М441.006936. Срок действия до 22.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (п. 3.4), ГОСТ Р МЭК 60901-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (ЕН 1080-1:1998), ГОСТ 31515.3-2012 (ЕН 1080-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60901-1-3-2014. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТС N RU Д-П.РСБ2.В.00033. Срок действия до 20.06.2020. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 32705 от 20.11.2013.

М2 Клава (М2К-7219-МВ). Регистрационное удостоверение ФCS 2012/12100 от 12.06.2012. Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС ИР М434.001143. Срок действия до 04.07.2020. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4, ГОСТ Р 50267.9-92, ГОСТ 31515.1-2012, ГОСТ 31515.3-2012, ГОСТ 31515.3-2012, ГОСТ Р МЭК 60901-1-2010, ГОСТ 30824.1.3-2012, ГОСТ 30824.4.3-2012. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТС N RU Д-П.РСБ2.В.00032. Срок действия до 20.06.2020. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 46954 от 26.06.2012.

М2 Клава (М2К-7223-МВ). Регистрационное удостоверение ФCS 2012/12100 от 12.06.2012. Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС ИР М434.001143. Срок действия до 04.07.2020. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4, ГОСТ Р 50267.9-92, ГОСТ 31515.1-2012, ГОСТ 31515.3-2012, ГОСТ 31515.3-2012, ГОСТ Р МЭК 60901-1-2010, ГОСТ 30824.1.3-2012, ГОСТ 30824.4.3-2012. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТС N RU Д-П.РСБ2.В.00032. Срок действия до 20.06.2020. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 46954 от 26.06.2012.

М1 (М1В-0114-МВ). Регистрационное удостоверение ФCS 2009/04432 от 13.08.2012. Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС ИР М441.006940. Срок действия до 22.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (п. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60901-1-2010, ГОСТ 31515.1-2012 (ЕН 1080-1:1998), ГОСТ 31515.3-2012 (ЕН 1080-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60901-1-3-2014. Декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТС N RU Д-П.РСБ2.В.00036. Срок действия до 18.06.2020. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 32705 от 20.11.2013.

RU (RUS-0113-RU). Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/04483 от 18.08.2012.
Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС Р.ИМ41.005041.
Срок действия до 22.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-02 (з. 3, 4),
ГОСТ Р МЭК 60501-1-2010, ГОСТ 31515.1-2012 (ЕН 1060-1:1996), ГОСТ 31515.3-2012
(ЕН 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60501-1-2-2014. Декларация о соответствии Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств» ТС И RU Д-Р.РС22.6.00016. Срок действия до 18.06.2020. Свидетельство
об утверждении типа средств измерений № 32706 от 20.11.2013.

RU (RUS-0208-RU). Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/05077 от 18.08.2012.
Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС Р.ИМ41.005043.
Срок действия до 22.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-02 (з. 3, 4),
ГОСТ Р МЭК 60501-1-2010, ГОСТ 31515.1-2012 (ЕН 1060-1:1996), ГОСТ 31515.3-2012
(ЕН 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60501-1-2-2014. Декларация о соответствии Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств» ТС И RU Д-Р.РС22.6.00016. Срок действия до 18.06.2020. Свидетельство
об утверждении типа средств измерений № 32706 от 20.11.2013.

RU (RUS-0065-RU). Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06306 от 18.08.2012.
Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС Р.ИМ41.005044.
Срок действия до 22.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-02 (з. 3, 4),
ГОСТ Р МЭК 60501-1-2010, ГОСТ 31515.1-2012 (ЕН 1060-1:1996), ГОСТ 31515.3-2012
(ЕН 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60501-1-2-2014. Декларация о соответствии Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств» ТС И RU Д-Р.РС22.6.00016. Срок действия до 18.06.2020. Свидетельство
об утверждении типа средств измерений № 32706 от 20.11.2013.

SI (RUS-0066-RU). Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03076 от 18.08.2012.
Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС Р.ИМ41.005086.
Срок действия до 14.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-02 (з. 3, 4),
ГОСТ Р МЭК 60501-1-2010, ГОСТ 31515.1-2012 (ЕН 1060-1:1996), ГОСТ 31515.3-2012
(ЕН 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60501-1-2-2014. Декларация о соответствии Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств» ТС И RU Д-Р.РС22.6.00016. Срок действия до 18.06.2020. Свидетельство
об утверждении типа средств измерений № 32706 от 20.11.2013.

SI (RUS-0067-RU). Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02180 от 18.08.2012.
Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС Р.ИМ41.005088.
Срок действия до 14.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-02 (з. 3, 4),
ГОСТ Р МЭК 60501-1-2010, ГОСТ 31515.1-2012 (ЕН 1060-1:1996), ГОСТ 31515.3-2012
(ЕН 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60501-1-2-2014. Декларация о соответствии Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств» ТС И RU Д-Р.РС22.6.00019. Срок действия до 18.06.2020. Свидетельство
об утверждении типа средств измерений № 32706 от 20.11.2013.

SI (RUS-0013-RU). Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02157 от 18.08.2012.
Срок действия не ограничен. Декларация о соответствии РОСС Р.ИМ41.005080.
Срок действия до 14.08.2018. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-02 (з. 3, 4),
ГОСТ Р МЭК 60501-1-2010, ГОСТ 31515.1-2012 (ЕН 1060-1:1996), ГОСТ 31515.3-2012
(ЕН 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60501-1-2-2014. Декларация о соответствии Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств» ТС И RU Д-Р.РС22.6.00019. Срок действия до 18.06.2020. Свидетельство
об утверждении типа средств измерений № 32706 от 20.11.2013.

2021年4月1日

公認
人
印
生
印

April 1,

2021

**General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd
Takefumi Nakanishi**

Takefumi Nakanishi


オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪52番地

公証人役場

20	
19	
18	
17	
16	
15	
14	
13	
12	公証人 天野和生
10	京都地方事務局所属
9	シカタ デイ ス ビル 5 階
8	京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町 4 3 6 番地の 2
7	令和 3 年 8 月 1 9 日, 本公証人役場において。
6	よって, これを認証する。
5	名を同人に代わり自認した。
4	人の面前において, 別紙私署証書における囑託人の署
3	囑託人中西剛文の代理人藤田恭子は, 本日, 本公証
2	認 証 証 書
1	令和 3 年 第 4 9 0 号

ment
No., Ltd

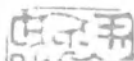



Registered No.490

NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that Kyoko Fujita, an agent of Takefumi Nakanishi, has stated in my very presence that said Takefumi Nakanishi, has acknowledged himself that signature on the attached document is his own.

Dated this 19th day of Aug.2021

A M A N O K a z u o

N o t a r y

436-2 Sasayamachi, Oike-sagaru,
Higashinotoin dori, Nakagyo-ku Kyoto
Kyoto District Legal Affairs Bureau



第 6 6 3 号

証 明

この認証の付与は、在職中の公証人がその権限に基づいてしたものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

令和 3 年 8 月 1 9 日

京都地方法務局長 西 田 正 延



Registration No.663

CERTIFICATE

This is to certify that the annexed Notarial Certificate has been executed by Notary, duly authorized and practising in Kyoto , Japan , and that the Official seal appearing on the same is genuine.

Date 2021.8.19

NISHIDA Masanobu

Director of the Kyoto District Legal Affairs Bureau

Перевод с английского языка на русский язык

ОМРОН (OMRON)
№: OHQ(CS)-RAF-210501

19 августа 2021 года

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)
53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

19 августа 2021 года

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что Киоко Фудзита, агент Такефуми Наканиси, подтвердил в моем присутствии, что указанный Такефуми Наканиси подтвердил подлинность своей подписи, проставленной в прилагаемом документе.

Дата: сегодня, 19 августа 2021 года

[подпись]

Кацуо Аmano

Нотариус

436-2 Сасаямачи, Ойке-сагару,

Хигашиноин дори, Накагио-ку Киото

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

[Печать:

Кацуо Аmano

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

НОТАРИУС

КИОТО, ЯПОНИЯ]

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что прилагаемое Нотариальное свидетельство было оформлено Нотариусом, надлежащим образом уполномоченным и осуществляющим свою деятельность в Киото, Япония, а также, что Официальная печать, проставленная на данном документе, является подлинной.

Дата: 19.8.2021 г.

НИСИДА Масанобу

Директор Регионального бюро по юридическим вопросам, Киото

Перевод данного текста выполнен переводчиком Алексеевым Алексеем Александровичем

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва.

Двадцать пятого августа две тысячи двадцать первого года.

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы, Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подлинности перевода Алексея Алексея Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2021- *42-2047*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Л. В. Дейнеко

**Гербовая печать
нотариуса г.
Москвы
Прокошенковой Е.Е.**



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 27 лист(-а,-ов).

ПОДПИСЬ

Л. В. Дейнеко

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого августа две тысячи двадцать первого года
Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2021- *42-2042*
Уплачено за совершение нотариального действия: 1680 руб. 00 коп.



Л. В. Дейнеко

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 27 лист(а) (ов)

Врио нотариуса

Л. В. Дейнеко

Сопроводительное письмо

Cover letter

Мы, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN, направляем следующую эксплуатационную документацию нашему уполномоченному представителю АО «КомплектСервис», 125413, г. Москва, Солнечногорская ул., д. 4, стр. 10, мансарда (доверенность OHQ(CS)-RAF-201079 от 25 Марта 2021), в целях внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медицинское изделие: Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON в Федеральной Службе по Надзору в Сфере Здравоохранения (Росздравнадзор):

- Руководство по эксплуатации медицинского изделия Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Comfort (ALRU);

- Руководство по эксплуатации медицинского изделия Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M4 Intelli IT (ALRU);

- Инструкция по установке приложения медицинского изделия Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M4 Intelli IT (ALRU);

- Руководство по эксплуатации медицинского изделия Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Expert (ALRU);

-Гарантийный талон.

Настоящим удостоверяем, что представленная документация разработана на русском языке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Достоверность представленной информации подтверждаем.

We, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN submit following operating documents to our authorized representative ComplectService Co Ltd, mansard, bldg. 10, 4 Solnechnogorskaya st., Moscow 125413, Russian Federation (power of attorney OHQ(CS)-RAF-201079 dated March 25, 2021), for making changes in the documents of the registration dossier for medical device: Automatic Blood Pressure Monitor OMRON, in the Federal Service for Supervision in the Sphere of Health Care (Roszdravnadzor):

- Instruction manual for Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor OMRON M3 Comfort (ALRU);

- Instruction manual for Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor OMRON M4 Intelli IT (ALRU);

- Setup Instructions for Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor OMRON M4 Intelli IT (ALRU);

- Instruction manual for Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor OMRON M3 Expert (ALRU);

- Warranty card.

We hereby certify that the submitted documentation developed in Russian language, in accordance with the laws of the Russian Federation.

We confirm the accuracy of the provided information

August 19, 2021

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

Takefumi Nakanishi

General Manager

Regulatory Affairs Department

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd

All for Healthcare

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN

OMRON



Setup Instructions

Thank you for purchasing an OMRON product.

With OMRON connect you can wirelessly sync measurements to your smartphone to easily view, save, and manage your health data.

To get started go to:

omronconnect.com/setup

*If you already have the OMRON connect app go to:
Menu > Device > Add Device

For more details, visit:

omronconnect.com

All for Healthcare

3135911-7A
PM-1496-03-07/2017

Anleitung zur Installation

DE

Vielen Dank, dass Sie ein OMRON-Produkt erworben haben.

Mit OMRON Connect können Sie Messungen drahtlos mit Ihrem Smartphone synchronisieren, sodass Sie Ihre Gesundheitsdaten bequem anzeigen, speichern und verwalten können.

Starten Sie hier: **omronconnect.com/setup**

Wenn Sie die App OMRON Connect heruntergeladen und installiert haben, gehen Sie weiter zu Schritt 4. Schritt 5 ist optional.

Weitere Details finden Sie unter: **omronconnect.com**

Instructions d'installation

FR

Merci d'avoir acheté un produit OMRON.

Avec OMRON Connect, vous pouvez synchroniser vos mesures vers votre smartphone via une connexion sans fil pour visualiser, enregistrer et gérer plus facilement vos données de santé.

Pour commencer, accédez à : **omronconnect.com/setup**

Si vous avez déjà téléchargé l'application OMRON Connect, allez à l'étape 4. L'étape 5 est facultative.

Pour plus de détails, accédez à : **omronconnect.com**

Instrucciones de configuración

ES

Le agradecemos que haya adquirido un producto OMRON.

Con OMRON connect puede sincronizar de forma inalámbrica mediciones en su teléfono inteligente para ver, guardar y gestionar con facilidad su datos sobre salud.

Para empezar, vaya a: **omronconnect.com/setup**

Si ya dispone de la aplicación OMRON Connect, vaya al Paso 4. El Paso 5 es opcional.

Para obtener más detalles, visite: **omronconnect.com**

Istruzioni per la configurazione

IT

Grazie per aver acquistato un prodotto OMRON.

Con OMRON connect puoi sincronizzare le misurazioni in modalità wireless con il tuo smartphone, per visualizzare, salvare e gestire con facilità i dati relativi alla tua salute.

Per iniziare, vai a: **omronconnect.com/setup**

Se hai già scaricato l'app OMRON Connect, vai alla Fase 4. La Fase 5 è facoltativa.

Per ulteriori informazioni, visita: **omronconnect.com**

Инструкция по установке приложения

RU

Благодарим Вас за покупку продукции компании OMRON.

С OMRON connect Вы можете беспроводным способом синхронизировать показания прибора со смартфоном, чтобы легко просматривать, сохранять и управлять Вашей медицинской информацией.

Чтобы приступить, перейдите по ссылке: **omronconnect.com/setup**

Если у Вас уже установлено приложение OMRON Connect, перейдите к шагу 4. Шаг 5 является необязательным.

Дополнительную информацию смотрите на сайте: **omronconnect.com**



OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Измеритель
артериального давления
и частоты пульса
торговой марки OMRON**



ЕАС

Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-BPM-RU-03-04/2018
8800861-4C

Срок гарантии на электронный блок – 5 лет

*Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание**

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. При покупке требуйте правильного заполнения гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
 - использования прибора с нарушением требований Руководства по эксплуатации;
 - при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
 - наличия механических или иных повреждений изделия;
 - проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
 - разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию прибора;
 - подключения к электросети через сетевые адаптеры, не рекомендованные фирмой OMRON.
3. Основная гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом комплектующих и расходных материалов, имеющих ограниченный срок службы (манжет компрессионных, кабелей USB, адаптеров сетевых, элементов питания и пр.);
 - использованием некачественных, выработавших свой ресурс принадлежностей;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

* Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание – сервисное обслуживание в течение установленного срока службы изделия, включающее в себя:

- проверку изделия на соответствие техническим параметрам;
- восстановление работоспособности изделия без замены деталей (необходимая замена деталей проводится за счет потребителя без взимания платы за проводимые работы, за исключением случаев ремонта по гарантии в течение действия гарантийного срока);
- консультации по использованию и хранению изделия.

Срок службы изделия исчисляется с даты покупки изделия.

Срок службы: электронный блок – 5 лет.

В зависимости от модели, в состав измерителя артериального давления могут входить следующие комплектующие и (или) расходные материалы:

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
манжета компрессионная	1 год	5 лет
кабель USB	1 год	1 год
адаптер сетевой	2 года	5 лет
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях..» входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

В соответствии с п. 5 статьи 18 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 «Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.

Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.»

Гарантийный талон

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи « _____ » _____ г.

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен,
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя _____

Дата обращения « _____ » _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю « _____ » _____ г.

Подпись _____ Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

Дата обращения « _____ » _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю « _____ » _____ г.

Подпись
или штамп мастера

Работу принял _____
(подпись клиента)

Дата обращения « _____ » _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю « _____ » _____ г.

Подпись
или штамп мастера

Работу принял _____
(подпись клиента)

OMRON

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON В РОССИИ

АО «КомплектСервис»

Уполномоченный представитель производителя,
эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON
на территории Российской Федерации

125413, Москва, ул. Солнечнаягорская, д. 4, стр. 10, мансарда

Тел/факс: (495) 987-18-92, 221-73-45

E-mail: info@csmedica.ru

www.csmedica.ru • csmedica.ru

Адрес и телефон Центра технического обслуживания
продукции OMRON в Москве

ООО «СиЭсМедика ТехЭксперт»:

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3

Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)

E-mail: cstechexpert@mail.ru • www.cstechexpert.ru

Часы работы Центра технического обслуживания продукции OMRON:

пн-пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед),

сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед),

вс и праздничные дни – выходной

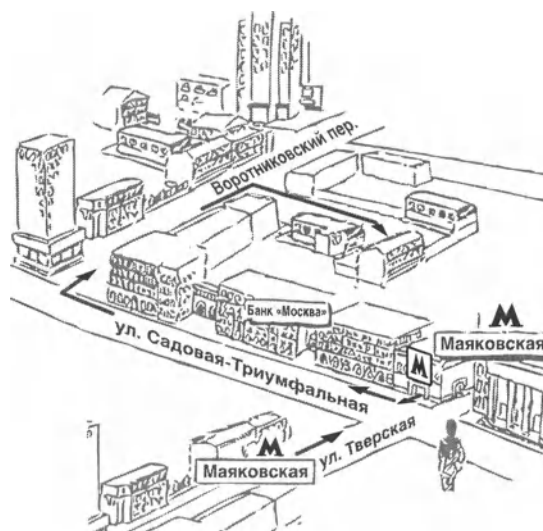


Схема расположения
Центра технического
обслуживания
продукции OMRON
в Москве

OMRON

- Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22,
тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26,
тел.: (86137) 58-202, cs_mediamt@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63,
тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134,
тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886,
тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архирейская, д. 2А, оф. 11,
тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье»
(Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25,
csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41 тел.: (3953) 36-29-28,
bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1,
тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад»,
ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье»
(Хабаровск), ул. Ладо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28,
csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6,
тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф. 24,
тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский пр-т., д. 50, оф. 5,
тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, Офис «СиЭс Медика Черноземье»,
ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76,
voronezh@csmedica.vrn.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11,
тел.: (473) 232-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А,
тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117,
тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru

OMRON

- Иваново, ООО «СиЗс Медика Иваново», ул. Степанова, дом 5, оф. 105,
(4932) 26-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЗс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122,
тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30,
тел.: (3952) 48-74-74 office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЗс Медика Йошкар-Ола», пр-т Гагарина, д. 14А,
тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@mail-el.ru
- Казань, ООО «СиЗс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13,
тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru
Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13,
тел.: (843) 528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЗс Медика Калининград»,
ул. Нарвская, д. 49а, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65,
kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЗс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7,
тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-89,
csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЗс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103,
тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemeovo@csmedica.ru
- Киров, ООО «СиЗс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, к. 2,
тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru
- Кострома, ООО «СиЗс Медика Иваново», пр-т Мира, д. 51,
тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СиЗс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1,
тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, omron@kubannet.ru
Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17,
тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СиЗс Медика Енисей»,
ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72,
221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЗс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1,
тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЗс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3,
тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЗс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9,
тел.: (3519) 29-49-14, mgn@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СиЗс Медика Махачкала», ул. Батырая, д. 11, оф. 734,
тел.: (8722) 55-85-40, (928) 941-00-20, csmahachkala@mail.ru

OMRON

- Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedica16@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murtmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, тел.: (908) 873-30-47, моб.: (902) 855-85-01, cstymen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Новокузнецк», пр-т Metallurgov, д. 48, тел.: (3843) 60-05-18, 46-46-44 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новороссийск, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Леднева, д. 5, тел.: (8617) 75-15-00, +7-938-525-15-00, cs_medicalnov@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedika_omsk@mail.ru
- Орёл, ООО «СиЭс Медика Орёл», ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54-24-00, orel@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, csprodmoskovia@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия», ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Россошь, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru

OMRON

- Ростов-на-Дону, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону»,
ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86),
231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЗс Медика Рязань», ул. Семена Серады, д. 42,
тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЗс Медика Самара»,
ул. Советской Армии, дом 180, стр. 1, оф. 306, тел.: (846) 250-15-79,
250-15-81, 250-51-18, csmedica-samara@sama.ru
Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114,
тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЗс Медика Северо-Запад»,
Малодетское-Сельский пр-т, д. 36, лит. Н, тел.: (812) 309-09-80,
csnw@csmedica.ru
Сервисно-консультационный центр, Малодетское-Сельский пр-т, д. 36, лит. Н,
тел.: (812) 409-40-30, spservice@csmedica.ru
- Саратов, ООО «СиЗс Медика Саратов», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3,
этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91,
csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЗс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124,
тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmsaratov@mail.ru
- Саров, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18,
тел.: (950) 360-70-77, arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», пр-т Победы, д. 54, пом. 37,
тел.: (978) 137-90-68, (910) 416-59-55, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЗс Медика Смоленск», пр-т Гагарина, д. 60,
тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район,
ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЗс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7,
тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СиЗс Медика Белгород», ул. Ватутина, д. 54,
тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЗс Медика Югра», ул. Малик-Карамова, д. 64, каб. №10,
тел.: (3462) 25-46-17, моб.: (912) 817-41-41
csyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru
- Тамбов, ООО «СиЗс Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, пом. 1,
тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЗс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23,
тел.: (4822) 32-89-66, tver@csmedica.ru

OMRON

- Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», б-р Гая, д. 1а, оф. 6,
тел.: (8482) 74-88-89, csmedica-ift@yandex.ru
- Томск, ООО «СиЭс Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1,
подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149,
тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Холодильная, д. 142, оф. 12,
тел.: (3452) 34-22-70, (932) 321-46-21, cstyumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Терешковой, д. 6, оф. 43,
тел.: (3012) 23-01-61, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород),
Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128,
csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10,
тел.: (3472) 34-18-08, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье»,
ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65,
csmedica-amur@yandex.ru
- Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107,
тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145,
тел.: (351) 237-48-93, che@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда», пр-т Луначарского, д. 51, оф. 11,
тел.: (8202) 55-52-63, моб.: (921) 834-78-65 csmedicacheerovets@gambler.ru
- Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск),
ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Иконова, д. 110а,
тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shakhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль»,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 90-66-53, 20-12-50, 73-11-82
yagoslavl@csmedica.ru

OMRON

Внимание! При утилизации данного прибора и отработанных элементов питания должны соблюдаться законодательные нормы России касательно отходов электронного оборудования.



Сведения о периодической поверке:

Модель _____

Прибор заводской №: _____

Прошел периодическую поверку


Знак поверки _____



АО «КомпектСервис»
Уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации

По вопросам реализации и закупок обращайтесь по адресу:
125413, Москва, ул. Солнечнаягорская, д. 4, стр. 10, мансарда
Тел/факс: (495) 887-18-92, 221-73-45 • E-mail: info@csmedica.ru
www.csmedica.ru • sksmedica.rf

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

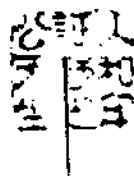

2021

General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Lt
Takefumi Nakanishi

Handwritten signature of Takefumi Nakanishi

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府高田町寺戸九ノ坪53番地

令和3年 第 494 号

認 証 証 書

嘱託人中西剛文の代理人藤田恭子は、本日、本公証
人の面前において、別紙私署証書における嘱託人の署
名を同人に代わり自認した。

よって、これを認証する。

令和3年8月19日、本公証人役場において。

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地の2

シカタ ディス ビル5階

京都地方法務局所属

公証人

天野和生



公証人役場

tment
Co., Lt




Registered No.494

NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that Kyoko Fujita, an agent of Takefumi Nakanishi, has stated in my very presence that said Takefumi Nakanishi, has acknowledged himself that signature on the attached document is his own.

Dated this 19th day of Aug. 2021

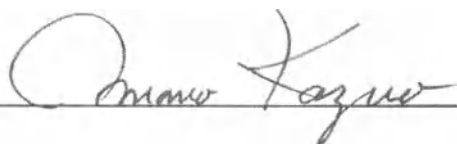

AMANO Kazuo

Notary

436-2 Sasayamachi, Oike-sagaru,
Higashinotoin dori, Nakagyo-ku Kyoto
Kyoto District Legal Affairs Bureau



第 6 6 7 号

証 明

この認証の付与は、在職中の公証人がその権限に基づいてしたものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

令和 3 年 8 月 1 9 日

京都地方法務局長 西 田 正 延



Registration No.667

CERTIFICATE

This is to certify that the annexed Notarial Certificate has been executed by Notary, duly authorized and practising in Kyoto , Japan , and that the Official seal appearing on the same is genuine.

Date 2021.8.19

NISHIDA Masanobu

Director of the Kyoto District Legal Affairs Bureau

Перевод с английского языка на русский язык

ОМРОН (OMRON)
№: OHQ(CS)-RAF-210505

19 августа 2021 года

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)
53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

19 августа 2021 года

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что Киоко Фудзита, агент Такефуми Наканиси, подтвердил в моем присутствии, что указанный Такефуми Наканиси подтвердил подлинность своей подписи, проставленной в прилагаемом документе.

Дата: сегодня, 19 августа 2021 года

[подпись]

Кацуо Аmano

Нотариус

436-2 Сасаямачи, Ойке-сагару,

Хигашинотоин дори, Накагио-ку Киото

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

[Печать:

Кацуо Аmano

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

НОТАРИУС

КИОТО, ЯПОНИЯ]

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что прилагаемое Нотариальное свидетельство было оформлено Нотариусом, надлежащим образом уполномоченным и осуществляющим свою деятельность в Киото, Япония, а также, что Официальная печать, проставленная на данном документе, является подлинной.

Дата: 19.8.2021 г.

НИСИДА Масанобу

Директор Регионального бюро по юридическим вопросам, Киото

Перевод данного текста выполнен переводчиком Алексеевым Алексеем Александровичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва.

Двадцать пятого августа две тысячи двадцать первого года.

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы, Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Алексеева Алексея Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2021- *42-2032*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Л. В. Дейнеко

Гербовая печать
нотариуса г.
Москвы
Прокошенковой Е.Е.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 29 лист(-а,-ов).

ПОДПИСЬ

Л. В. Дейнеко

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого августа две тысячи двадцать первого года
Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая
обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены
Евгеньевны, свидетельствую верность копии с представленного мне
документа.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2021- *42-2033*
Уплачено за совершение нотариального действия: 1800 руб. 00
коп.



Л. В. Дейнеко

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 29 лист(а) (ов)

Врио нотариуса

Л. В. Дейнеко