

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЗЛМК «ШАНС»



В.В. Пикалов

«01» сентября 2021 г.

М.П.



**Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017**

Паспорт. Версия №4

**Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017**

Паспорт

**Исполнение: Кровать медицинская общепалатная
(М 3017-00, М 3017-01, М 3017-02, М 3017-03, М 3017-04,
М 3017-05, М 3017-06, М 3017-07, М 3017-08, М 3017-09,
М 3017-10, М 3017-11)**

2021

ОБЩЕЕ

Действие настоящего паспорта распространяется на следующие варианты исполнения:

- Кровать медицинская общепалатная на поддонах, на стационарных опорах М 3017-00;
- Кровать медицинская общепалатная на поддонах, на колёсах: М 3017-01;
- Кровать медицинская общепалатная на полосе, на стационарных опорах: М 3017-02;
- Кровать медицинская общепалатная на полосе, на колёсах: М 3017-03
- Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, на стационарных опорах: М 3017-04;
- Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, на колёсах: М 3017-05;
- Кровать медицинская общепалатная на поддонах, с подъёмным подголовником на стационарных опорах: М 3017-06;
- Кровать медицинская общепалатная на поддонах, с подъёмным подголовником на колёсах: М 3017-07;
- Кровать медицинская общепалатная на полосе, с подъёмным подголовником на стационарных опорах: М 3017-08;
- Кровать медицинская общепалатная на полосе, с подъёмным подголовником на колёсах: М 3017-09;
- Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, с подъёмным подголовником на стационарных опорах: М 3017-10;
- Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, с подъёмным подголовником на колёсах: М 3017-11.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры кроватей указаны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров					
	М3017-00	М3017-01	М3017-02	М3017-03	М3017-04	М3017-05
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	2100x823x780	2100x823x780	2100x823x780	2100x823x780	2100x823x780	2100x823x780
Масса, кг (± 2 кг)	18	22	18	22	18	22

Таблица 2

Наименование параметров	Значение параметров					
	М3017-06	М3017-07	М3017-08	М3017-09	М3017-10	М3017-11
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2100x823x780	2100x823x780	2100x823x780	2100x823x780	2100x823x780	2100x823x780
Масса, кг (± 2 кг)	36	40	36	40	36	40

3.2 Характеристики

- Все модели кроватей изготавливаются из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечений на основе единой базовой конструкции и состоят из следующих узлов: рамы, спинки, опоры, подголовника (для отдельных моделей кроватей).
- Опоры кроватей могут быть выполнены в двух модификациях:
 - на колесах (модели 3017-01, М 3017-03, М 3017-05, М 3017-07, М 3017-09, М 3017-11);
 - на стационарных опорах (модели М 3017-00, М 3017-02, М 3017-04, М 3017-06, М 3017-08, М 3017-10).
- Кровати, в зависимости от модели, имеют одну секцию (модели: М 3017-00; М 3017-01; М 3017-02; М 3017-03; М 3017-04; М 3017-05), две секции (модели: М 3017-06; М 3017-07; М 3017-08; М 3017-09; М 3017-10; М 3017-11), позволяющие придать телу больного наиболее удобное положение. Все манипуляции с секциями производятся вручную.
- Секции кроватей могут быть выполнены в трех модификациях:
 - на поддонах (модели М 3017-00, М 3017-01, М 3017-06, М 3017-07);
 - на полосе (модели М 3017-02, М 3017-03, М 3017-08, М 3017-09);
 - на цельносварной сетке (модели М 3017-04, М 3017-05, М 3017-10, М 3017-11) с ячейкой (50 x 100) мм.
- Модификации кроватей М 3017-06, М 3017-07, М 3017-08, М 3017-09, М 3017-10, М 3017-11 с подъемным подголовником. Наклон подголовника регулируется на угол от 0-45° (шаг регулировки составляет 6°).
- Фиксация подголовника кровати (модели: М 3017-06; М 3017-07; М 3017-08; М 3017-09; М 3017-10; М 3017-11) в необходимое положение осуществляется при помощи гребенки и опоры.
- Кровать выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 150 кг.
- Кровать установлена на четыре колесные опоры, вращающиеся вокруг вертикальной оси. Два колеса оснащены тормозом.
- Колеса кровати (для кровати на колесах) должны вращаться свободно, без заедания.
- Усилие, необходимое для включения тормозной системы кровати (на колесах), должно быть не более 200 Н (20 кг).
- Усилие перемещения кроватей с номинальной нагрузкой не более 300Н (30 кг), при этом колеса должны быть сориентированы в направлении движения.
- Кровати должны стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек или одним из колес кровати должен быть не более 3 мм.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность кроватей представлена в таблицах 3-15.

Таблица 3 - Кровать медицинская общепалатная на поддонах, на стационарных опорах М 3017-00

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1 шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	2 шт.

Таблица 4 - Кровать медицинская общепалатная на поддонах, на колёсах: М 3017-01

Обозначение детали	Количество
1. Спинка	2 шт.
2. Царга	1 шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	2 шт.
5. Колесо ø125	4 шт.

Таблица 5- Кровать медицинская общепалатная на полосе, на стационарных опорах: М 3017-02

Обозначение детали	Количество
1. Спинка	2 шт.
2. Царга	1 шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	1 шт.

Таблица 6 - Кровать медицинская общепалатная на полосе, на колёсах: М 3017-03

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1 шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	2 шт.
5. Колесо ø125	4 шт.

Таблица 7 - Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, на стационарных опорах: М 3017-04

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1 шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	2 шт.

Таблица 8 - Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, на стационарных опорах: М 3017-04

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1 шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	2 шт.

Таблица 9 - Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, на колёсах: М 3017-05

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1 шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	3 шт.
5. Колесо ø125	4 шт.

Таблица 10 - Кровать медицинская общепалатная на поддонах, с подъёмным подголовником на стационарных опорах: М 3017-06

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1 шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	3 шт.

Таблица 11 - Кровать медицинская общепалатная на поддонах, с подъёмным подголовником на колёсах: М 3017-07

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	3шт.
5. Колесо ø125	4 шт.

Таблица 12 - Кровать медицинская общепалатная на полосе, с подъёмным подголовником на стационарных опорах: М 3017-08

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	3шт.

Таблица 13 - Кровать медицинская общепалатная на полосе, с подъёмным подголовником на колёсах: М 3017-09

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	3шт.
5. Колесо ø125	4 шт.

Таблица 14 - Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, с подъёмным подголовником на стационарных опорах: М 3017-10

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	3шт.

Таблица 15 - Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, с подъёмным подголовником на колёсах: М 3017-11

Обозначение детали	Количество
1. Спинки	2 шт.
2. Царга	1шт.
3. Опора	1 шт.
4. Гайка М8	3шт.
5. Колесо ø125	4 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлечь кровать и фурнитуру из транспортной тары.

6.2 Проверить комплектность кровати.

6.3 После транспортирования кровать в условиях отрицательных температур её выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 2 часов.

- 6.4 Провести сборку кровати согласно инструкции по сборке пункт №7
- 6.5 Провести техническое обслуживание кроватей согласно разделу № 8 настоящего паспорта.
- 6.6 Произвести дезинфекцию кровати. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.
- 6.7 Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания кровати, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ (см. приложение)

- 7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
- 7.2 Сборку осуществлять двум работникам;
- 7.3 Установить вертикально первую спинку;
- 7.4 Вставить с одного края царгу клиньями в проушины спинки;
- 7.5 Вставить со второго края царгу клиньями в проушины второй спинки;
- 7.6 Переместить готовую кровать в спальное расположение;
- 7.7 Соединить болты упоров через отверстия в пластиках спинной секции гайкой М8.
- 7.8 Перед началом эксплуатации проверить надежность крепления всех узлов кровати, затяжку всех резьбовых соединений, работоспособность подъемной секции. Установить кровать на место, проверить действие тормоза на колесах.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке кроватей.
- 8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кроватей, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.
- 8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- 9.1 Общие положения:
- 9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.
- 9.3 Содержание текущего ремонта:
- 1) обнаружение неисправностей;
 - 2) исправление неисправностей;
 - 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.
- 9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.
- 9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование кроватей морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке кроватей соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения кроватей - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.6 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации кроватей - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения кроватей в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы кроватей 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет кровати или ее составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796; E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская общепалатная _____, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кровать медицинская общепалатная М3017 __, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакована (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Кровать медицинская общепалатная М3017 __, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____


(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 г.


(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

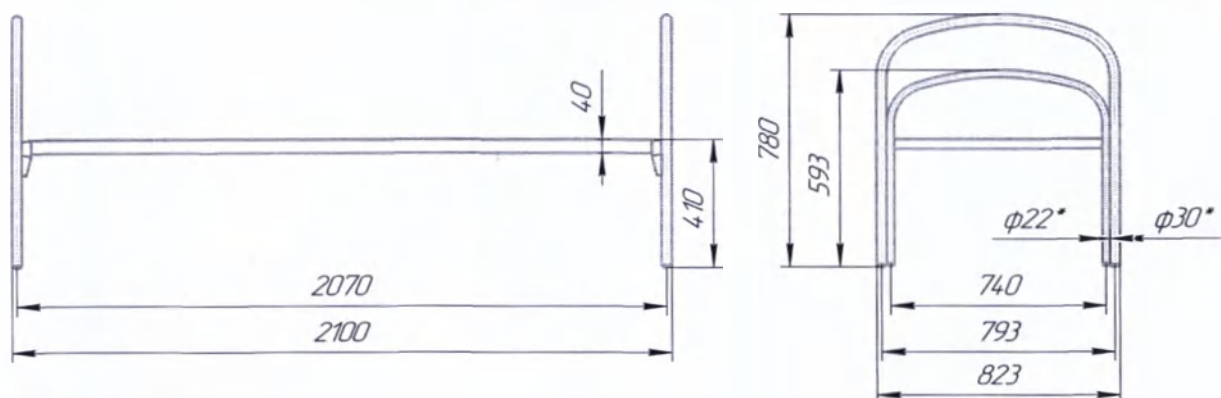

1.*размеры для справок

Рис. 1. Общий вид:


- Кровать медицинская общепалатная на поддонах, на стационарных опорах М 3017-00;
- Кровать медицинская общепалатная на полосе, на стационарных опорах М 3017-02;
- Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, на стационарных опорах М 3017-04.

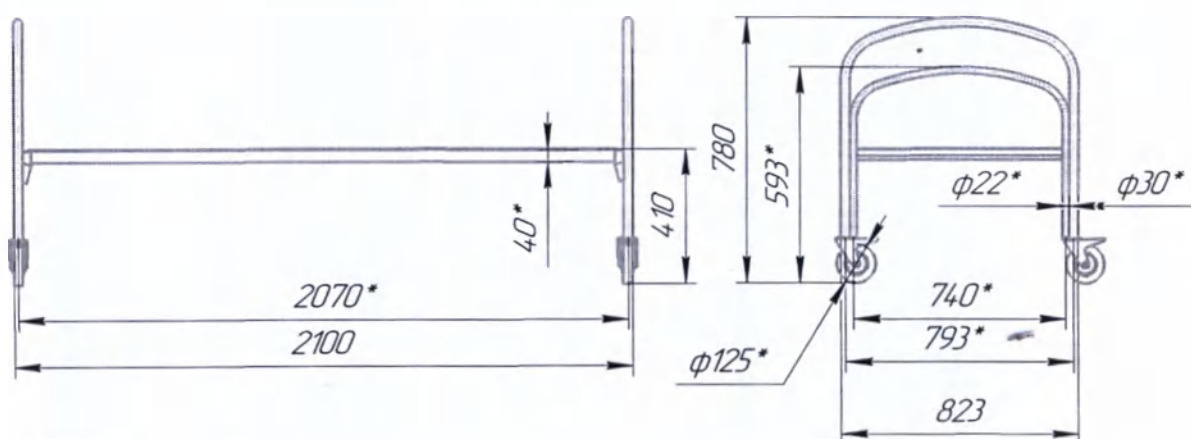

1.*размеры для справок

Рис. 2. Общий вид:


- Кровать медицинская общепалатная на поддонах, на колёсах М 3017-01;
- Кровать медицинская общепалатная на полосе, на колёсах М 3017-03;
- Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, на колёсах М 3017-05.

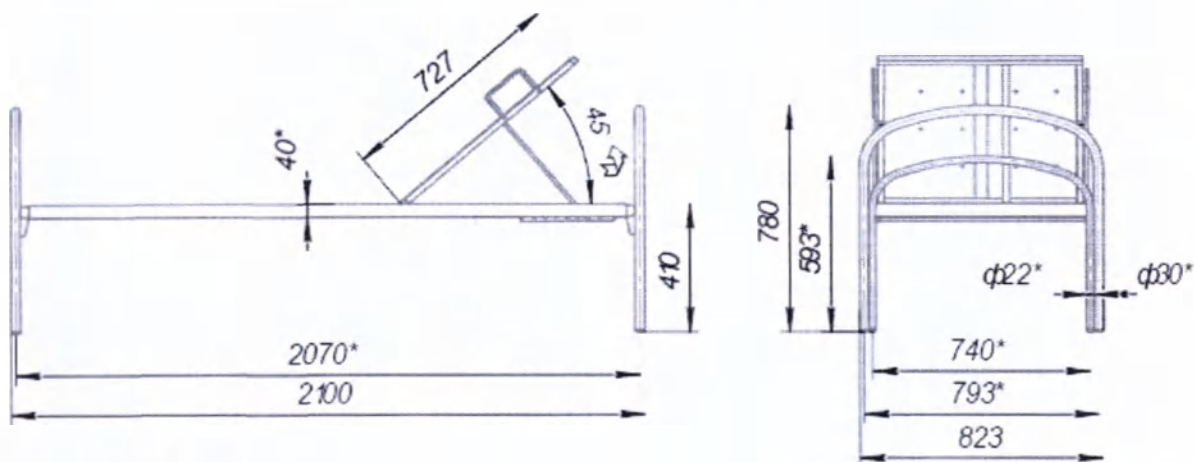

1.*размеры для справок

Рис. 3. Общий вид:

- Кровать медицинская общепалатная на поддонах, с подъёмным подголовником на стационарных опорах М 3017-06;
- Кровать медицинская общепалатная на полосе, с подъёмным подголовником на стационарных опорах М 3017-08;
- Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, с подъёмным подголовником на стационарных опорах М 3017-10

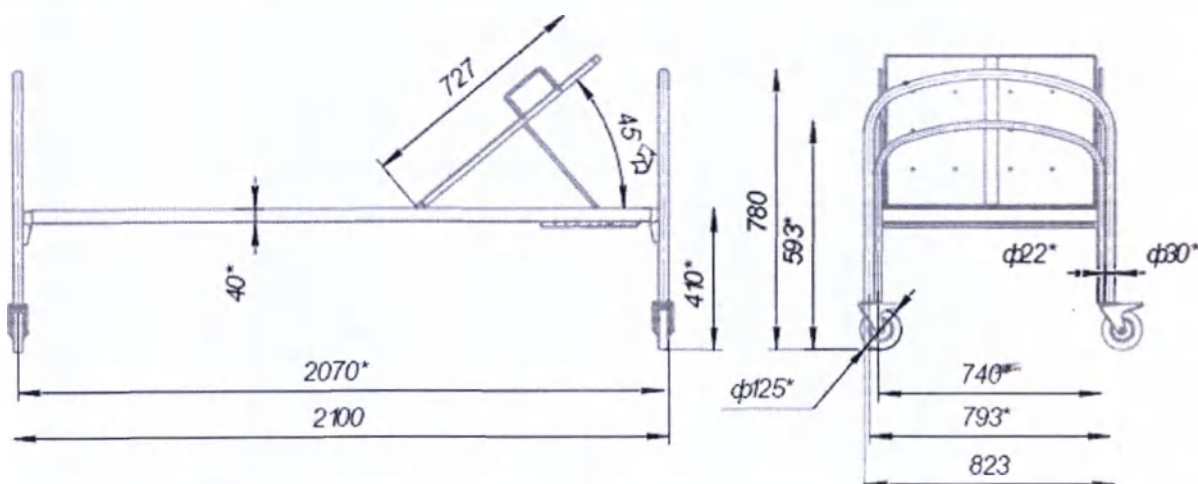

1.*размеры для справок

Рис. 4. Общий вид:

- Кровать медицинская общепалатная на поддонах, с подъёмным подголовником на колёсах М 3017-07;
- Кровать медицинская общепалатная на полосе, с подъёмным подголовником на колёсах М 3017-09;
- Кровать медицинская общепалатная на цельносварной сетке, с подъёмным подголовником на колёсах М 3017-11

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Ширма медицинская М 4019

2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры ширмы указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
	М 4019
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм, (± 10 мм)	665x506x1810
Масса, кг, (± 0,5 кг)	4

3.2 Характеристики

- Ширма представляет собой односекционное изделие, состоящее из каркаса и экрана, установленное на два самоориентирующиеся колеса, вращающихся вокруг вертикальной оси.
- Колеса ширмы должны вращаться свободно, без заедания.
- Усилие, необходимое для перемещения ширмы на колесах не более 10 Н (1 кг).
- Ширма должна стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одним из колес должен быть не более 3 мм.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность ширмы представлена в таблице 2.

Таблица 2- Ширма медицинская М 4019

Обозначение детали	Количество
1. Рамка	1
2. Полотно	1
3. Прут	2
4. Колесо мебельное ø50	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации ширмы допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования ширмы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее при комнатной температуре не менее 2-х часов.

6.2 Распакуйте ширму. Проверьте комплектность.

6.3 Провести сборку кровати согласно инструкции по сборке пункт №7

6.4 Провести техническое обслуживание кроватей согласно разделу № 8 настоящего паспорта.

6.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ (см. приложение)

7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2 Продеть пруты через полотно экрана.

7.3 Вставить пруты в отверстия в раме.

7.4 Перед началом эксплуатации проверить надежность креплений. Установить ширму на место.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке шкафа.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования шкафа, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование ширмы медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке ширмы медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения ширмы медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие ширмы медицинской требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации ширмы медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения ширмы медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы ширмы медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет ширмы медицинской, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма медицинская М 4019, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Ширма медицинская М 4019, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакована (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 ____ г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Ширма медицинская М 4019, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____


Номер и дата выпуска _____

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

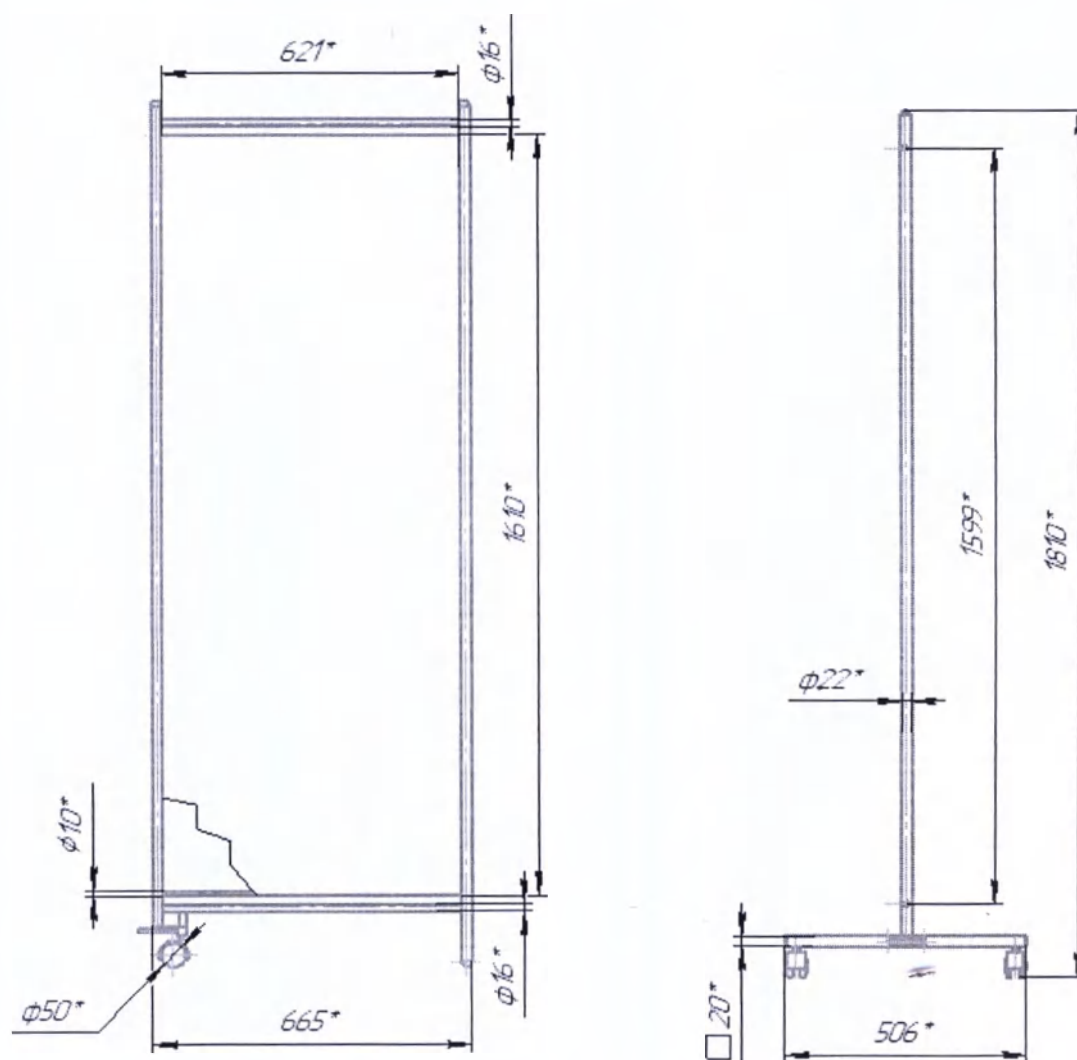

1* Размеры для справок

Рис.1- Ширма медицинская М 4019

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Штатив под капельницу
стационарный М 4008

2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры штатива указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
	М 4008
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	631x631x1765
Масса, кг ($\pm 0,5$ кг)	2

3.2 Характеристики

- Штатив представляет собой изделие, состоящее из стойки круглого сечения, с постоянной высотой, с двумя флакодержателями, и основания стационарного типа (трехлучевое с заглушками).
- Усилие, необходимое для перемещения штатива по ровному полу должно быть не более 10 Н (1 кг).
- Штатив выдерживает нагрузку массой не более 5 кг (при условии равномерного распределения нагрузки).
- Штатив должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и основанием должен быть не более 3 мм.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность штатива представлена в таблице 2.

Таблица 2- Штатив под капельницу стационарный М 4008

Обозначение детали	Количество
Штатив под капельницу	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации штатива допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования штатива в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать штатив и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию штатива. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

6.5 Запрещается использование неисправного изделия.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Штатив поставляется в собранном виде (см. Приложение).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Штатив для вливаний не требует специального технического обслуживания.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование штатива морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке штатива соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения штатива - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие штатива требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации штатива - не менее 18 месяца со дня ввода его в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения штатива в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы штатива 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет штатив, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штатив под капельницу стационарный М 4008, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Штатив под капельницу стационарный М 4008, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакован (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 ____ г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Штатив под капельницу стационарный М 4008, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____


(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

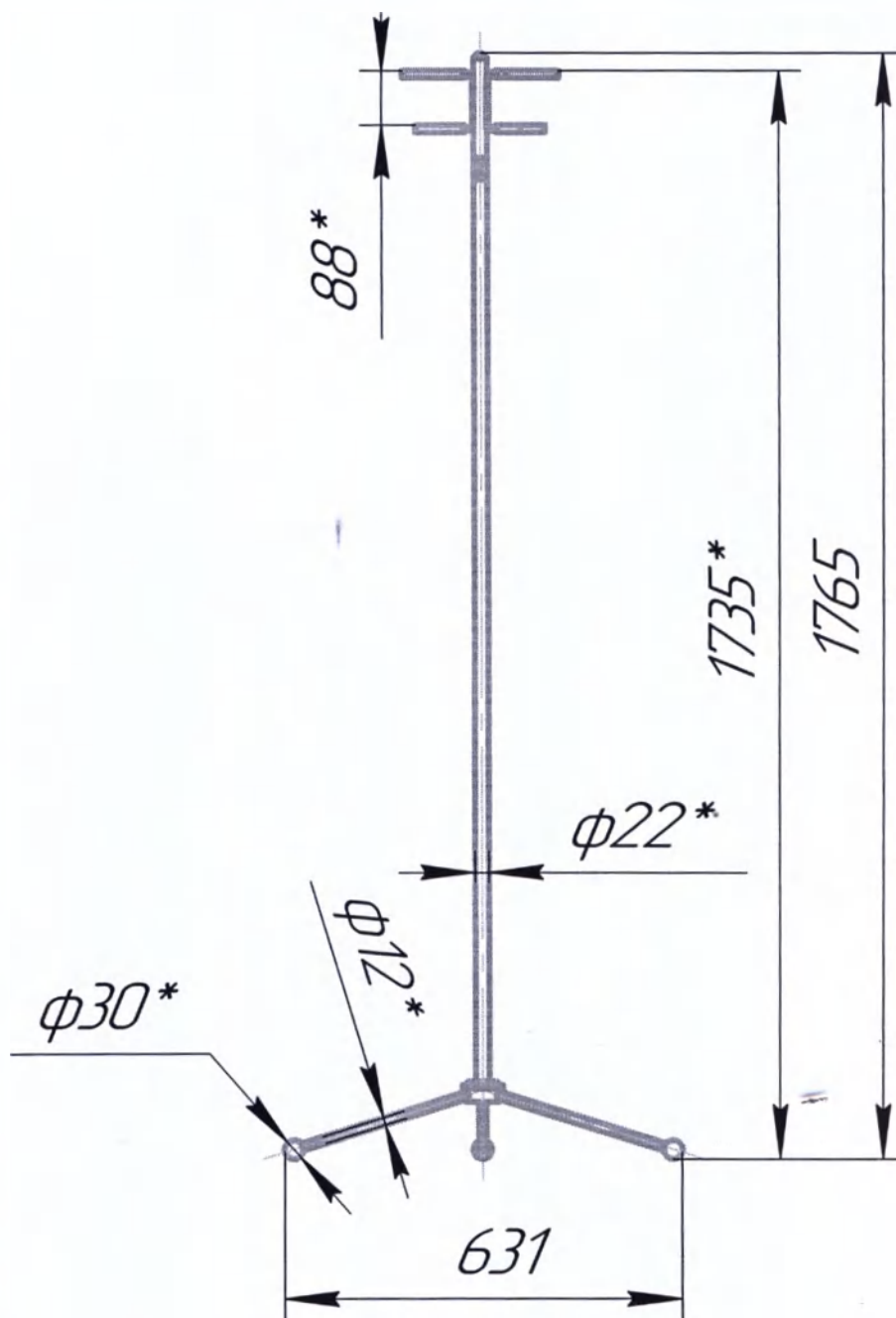

1*. Размеры для справок

Рис.1- Штатив под капельницу стационарный М 4008

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Кушетка смотровая М 2047

2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры кушетки указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
	М 2047
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	1900х600х570
Масса, кг. (± 2 кг)	13

3.2 Характеристики

- Кушетка смотровая представляет собой изделие сборно-разборной сварной конструкции. Основными частями конструкции являются: рама квадратного сечения, лежак.
- Лежак кушетки состоит из двух секций - подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 43°. Подголовник у кушетки регулируется плавно, бесступенчато - шаг регулировки отсутствует.
- Подъем и опускание подголовника производится рычажным методом при помощи прута, соединённого к кронштейну и продетого через зажим.
- Лежак и подголовник соединены в одно целое двумя шарнирами при помощи винтов самонарезающих. Рама и ножки фиксируются и закрепляются при помощи винтового соединения. Зажим крепится к раме винтовым соединением.
- Кронштейн закрепляется к подголовнику при помощи винтов самонарезающих и к которому закрепляется прут винтовым соединением. Лежак крепится к раме при помощи винтов самонарезающих.
- Кушетка выдерживает номинальную нагрузку массой не более 120 кг.
- Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм.
- Сборочные элементы кушетки, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность кушетки представлена в таблице 2.

Таблица 2- Кушетка смотровая: М 2047

Обозначение детали	Количество
1. Царга	1 шт.
2. Ножка	2 шт.
3. Ложе	1 шт.
4. Подголовник	1 шт.
5. Шарнир	2 шт.
6. Рычаг	1 шт.
7. Скоба	1 шт.
8. Хомут	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования кушетку в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать её в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию кушетки. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Распаковать изделие.

7.2 Проверить внешнее состояние сборочных узлов и лежака кушетки (см. приложение);

7.3 Уложить на подготовленную поверхность лежак;

7.4 Уложить и выставить по лежаку в сборе раму и закрепить при помощи саморезов 3,5x40;

7.5 Соединить ножки с рамой при помощи винтов восьми М6х35 и восьми гаек М6;

7.6 Соединить зажим с рамой при помощи болта М6х50 и гайки М6;

7.7 Соединить прут к кронштейну подголовника при помощи болта М6х50 и гайки М6;

7.8 Продеть прут в зажим и прикрутить заглушку шарик Ø30-М12;

7.9 Поставить кушетку на ноги;

7.10 Проверить подъём подголовника при помощи зажима и прута.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке кушетки.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кушетки, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

1) обнаружение неисправностей;

2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;

3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения кушетки в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы кушетки 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет кушетки, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; дефектную ведомость; гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка смотровая М 2047, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кушетка смотровая М 2047, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакована (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 ____ г.

15.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Кушетка смотровая М 2047, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____


(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

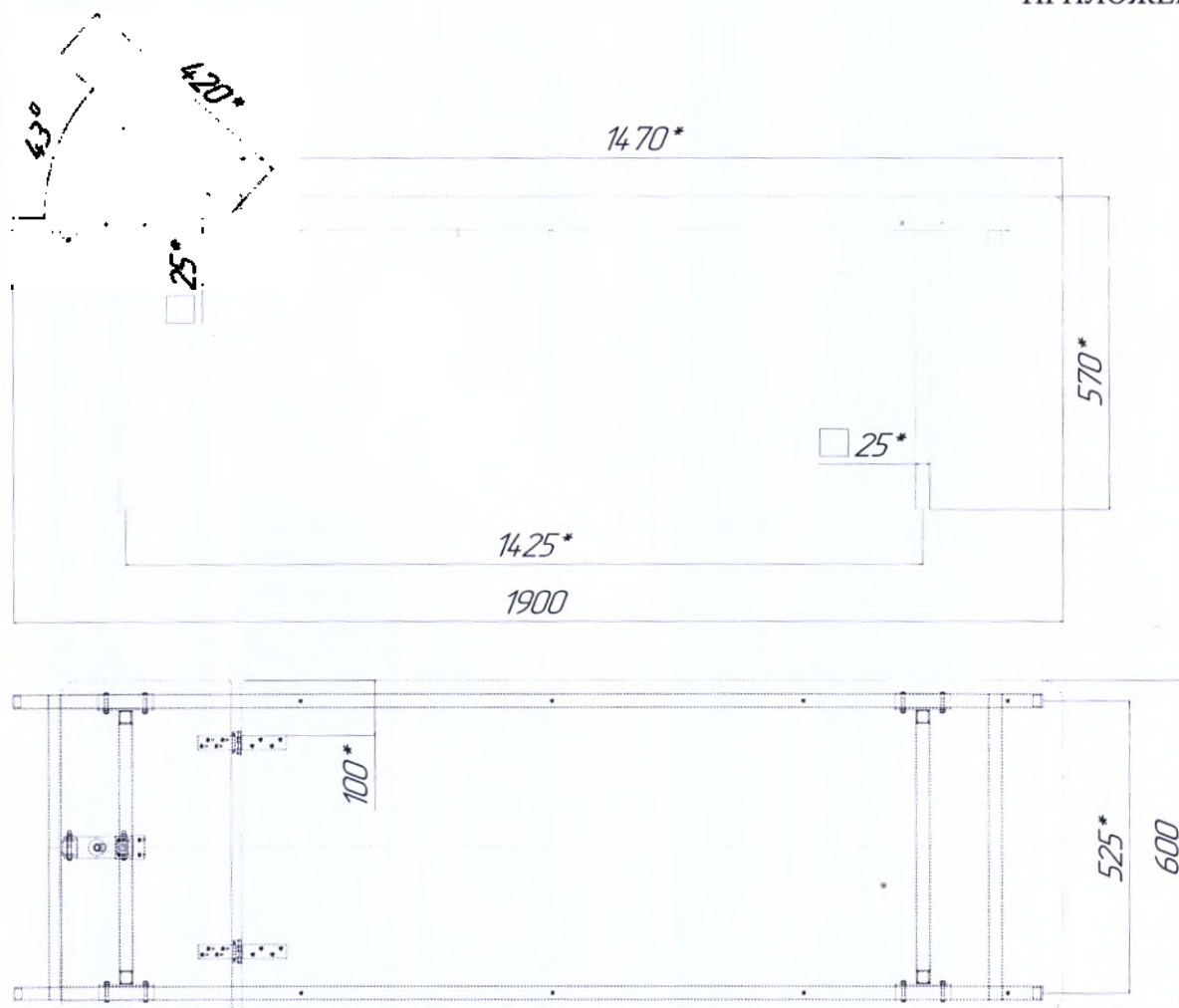

1* Размеры для справок

2. Каркас кушетки изготовлен из металлической трубы квадратного сечения 25x25

Рис. 1-Кушетка смотровая М 2047

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Столик подкатной М 4033

2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры столика указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
	М 4033
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	350х650х710-1100
Масса, кг. ($\pm 0,5$ кг)	6,5

3.2 Характеристики

- Столик состоит из двух опор в виде дуги, столешни, основания под столешню. В основание столика установлены четыре колеса, вращающихся вокруг вертикальной оси.
- Столик представляет собой телескопическую систему в виде двух труб, которые фиксируются с помощью винтов барашек. Это позволяет установить столешню на требуемую высоту.
- Колеса стола должны вращаться свободно, без заедания.
- Столик выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 50 кг. Допустимая нагрузка на полку: 15кг.
- Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой не более 100 Н (10 кг), при этом колеса столиков должны быть сориентированы в направлении движения.
- Столик должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и колесом должен быть не более 3 мм.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение детали	Количество
1. Основание	1
2. Основание под столешню	1
3. Столешня	1
4. Винт барашек	2
5. Колесо $\varnothing 50$	4
6. Саморез 3,5х35	4

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации столика допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования столика в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать столик и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2 Поставить основание на колёса (см. приложение);

7.3 Вставить дуги верхние в трубы основания и закрепить винтами барашками;

7.4 Перед началом эксплуатации проверить надежность крепления всех узлов столика, затяжку всех резьбовых соединений. Установить столик на место.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Периодический осмотр включает в себя:

- осмотр колес, надежность крепления колес к основанию, свободное вращение колес вокруг своей оси

8.2 Особое внимание необходимо обращать на надежность крепления колес.

Периодически, не реже 1 раза в месяц, прочищать их от грязи.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Содержание текущего ремонта:

Текущий ремонт включает следующие этапы:

1) обнаружение неисправностей;

2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;

3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование столика морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке столика соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения столика - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации столика - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения столика в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы штатива 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет столика, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик подкатной М 4033, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Столик подкатной М 4033, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакована (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 ____ г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Столик подкатной М 4033, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____


(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

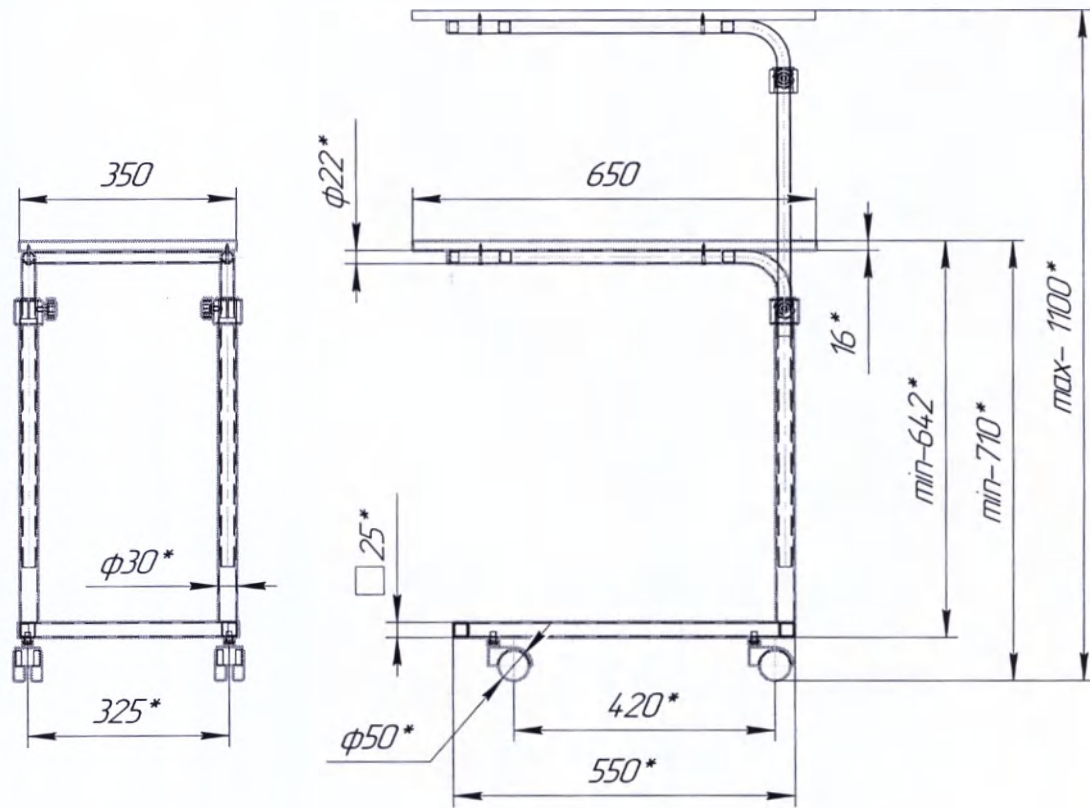

1* Размеры для справок

Рис.1- Столик подкатной М 4033

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Столик инструментальный М 4045,
М 4045-01, М 4045-02

2021

ОБЩЕЕ

Действие настоящего паспорта распространяется на следующие варианты исполнения:

- Столик инструментальный М 4045;
- Столик инструментальный М 4045-01;
- Столик инструментальный М 4045-02.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры столика указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров		
	М4045	М4045-01	М4045-02
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	600х410х790	600х410х790	600х410х790
Масса, кг. (± 1 кг)	5	5	5

3.2 Характеристики

- Столики представляют собой изделия сборно-разборной сварной конструкции, состоящие из каркаса, двух полок. В основание столика установлены четыре колеса, вращающихся вокруг вертикальной оси, без тормозов.
- Столик должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между одним из колёс и полом не должен быть более 3 мм.
- Столик выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 50 кг. Допустимая нагрузка на полку: 15кг.
- Колеса столика должны вращаться свободно, без заедания.
- Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой не более 150 Н (15 кг), при этом колеса столиков должны быть сориентированы в направлении движения.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение детали	Модели		
Наименование	М 4045	М 4045-01	М 4045-02
Каркас	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Полки	Стеклянные 2 шт.	Стеклянные 2 шт.	Стекло 1 шт., металлическая 1 шт.
Колесо ø50	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Присоска для стекла	4 шт.	-	-

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации столика допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 После транспортирования столика в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2 Распаковать столик и проверить целостность покрытия.
- 6.3 Проверить комплектность.
- 6.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
- 7.2 Поставить каркас на колёса (см. приложение);
- 7.3 Вставить присоски для стекла в пластики и закрепить полку;
- 7.4 Перед началом эксплуатации проверить надежность крепления всех узлов столика, затяжку всех резьбовых соединений. Установить столик на место.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 Периодический осмотр включает в себя:
 - осмотр колес, надежность крепления колес к основанию, свободное вращение колес вокруг своей оси;
- 8.1.1 Особое внимание необходимо обращать на надежность крепления колес. Периодически, не реже 1 раза в месяц, прочищать их от грязи.
- 8.2 Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- 9.1 Общие положения:
- 9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.
- 9.3 Содержание текущего ремонта:
Текущий ремонт включает следующие этапы:
 - 1) обнаружение неисправностей;
 - 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
 - 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.
- 9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.
- 9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.
- 11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации столика - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения столика в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы штатива 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет столика, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик инструментальный М 4045, М 4045-01, М 4045-02, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017 Заводской номер № _____, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Столик инструментальный М 4045, М 4045-01, М 4045-02, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017
Заводской номер № _____, упакована (наименование или шифр предприятия,
производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 ____ г.

15.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Столик инструментальный М 4045, М 4045-01, М 4045-02, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____


(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

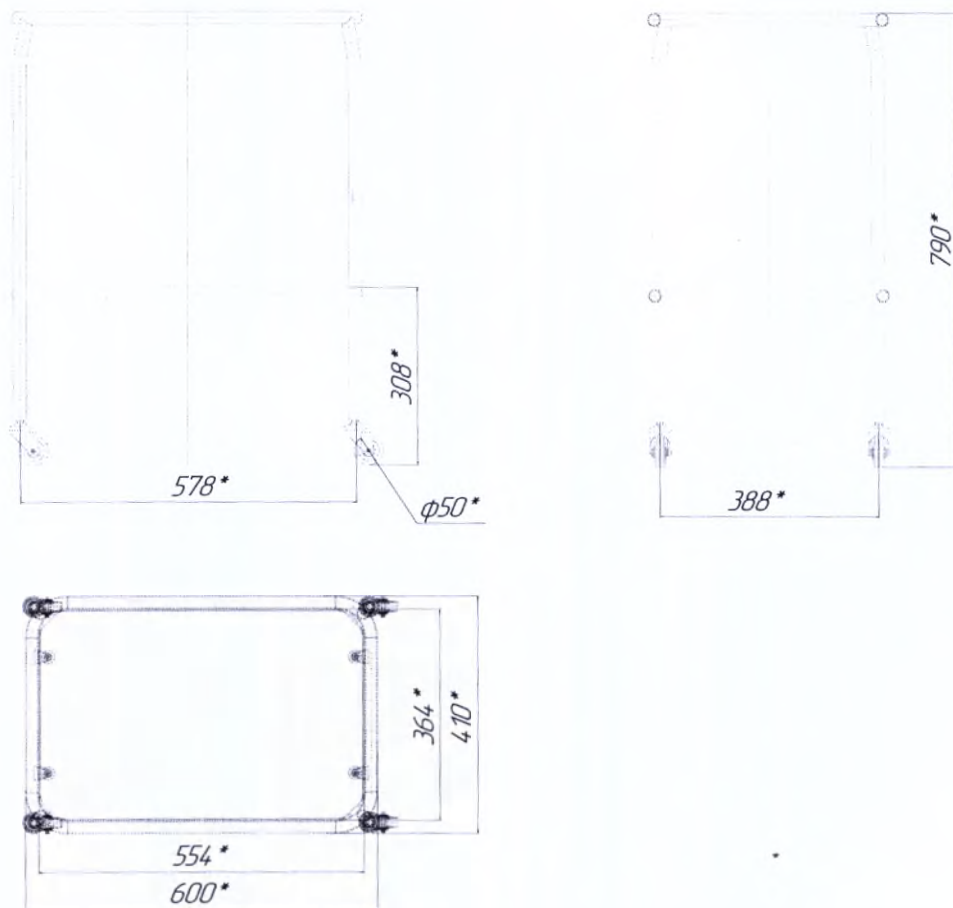

1* Размеры для справок

2* Каркас изготовлен из трубы ϕ 22 мм.

Рис.1-. Столик инструментальный М 4045, М 4045-01, М 4045-02

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Кушетка физиотерапевтическая
М 2047-01

2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры кушетки указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
	М 2047-01
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм, (± 10 мм)	1900х600х570
Масса, кг. (± 2 кг)	9

3.2 Характеристики

- Кушетка представляет собой изделие сборно-разборной сварной конструкции. Основными частями конструкции являются: рама квадратного сечения, лежак.
- Лежак кушетки состоит из двух секций - подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 43°. Подголовник у кушетки регулируется плавно, бесступенчато - шаг регулировки отсутствует.
- Подъём и опускание подголовника производится рычажным методом при помощи прута, соединённого к кронштейну и продетого через зажим.
- Лежак и подголовник соединены в одно целое двумя шарнирами при помощи винтов самонарезающих. Рама и ножки фиксируются и закрепляются при помощи винтового соединения. Зажим крепится к раме винтовым соединением.
- Кронштейн закрепляется к подголовнику при помощи винтов самонарезающих и к которому закрепляется прут винтовым соединением. Лежак крепится к раме при помощи винтов самонарезающих.
- Кушетка выдерживает номинальную нагрузку массой не более 120 кг.
- Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм.
- Сборочные элементы кушетки, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность кушетки представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение детали	Количество
1. Царга	1 шт.
2. Ножка	2 шт.
3. Ложе	1 шт.
4. Подголовник	1 шт.
5. Шарнир	2 шт.
6. Рычаг	1 шт.
7. Скоба	1 шт.
8. Хомут	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования кушетку в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать её в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию кушетки. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Распаковать изделие.

7.2 Проверить внешнее состояние сборочных узлов и лежака кушетки (см. Приложение);

7.3 Уложить на подготовленную поверхность лежак;

7.4 Уложить и выставить по лежаку в сборе раму и закрепить при помощи саморезов 3,5x40;

7.5 Соединить ножки с рамой при помощи винтов восьми М6х35 и восьми гаек М6;

7.6 Соединить зажим с рамой при помощи болта М6х50 и гайки М6;

7.7 Соединить прут к кронштейну подголовника при помощи болта М6х50 и гайки М6;

7.8 Продеть прут в зажим и прикрутить заглушку шарик ø30-М12;

7.9 Поставить кушетку на ноги;

7.10 Проверить подъём подголовника при помощи зажима и прута.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке кушетки.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кушетки, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

1) обнаружение неисправностей;

2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;

3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения кушетки в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы кушетки 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет кушетки, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; дефектную ведомость; гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка физиотерапевтическая М 2047-01, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кушетка физиотерапевтическая М 2047-01, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакована (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 ____ г.

15.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Кушетка физиотерапевтическая М 2047-01, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____


(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

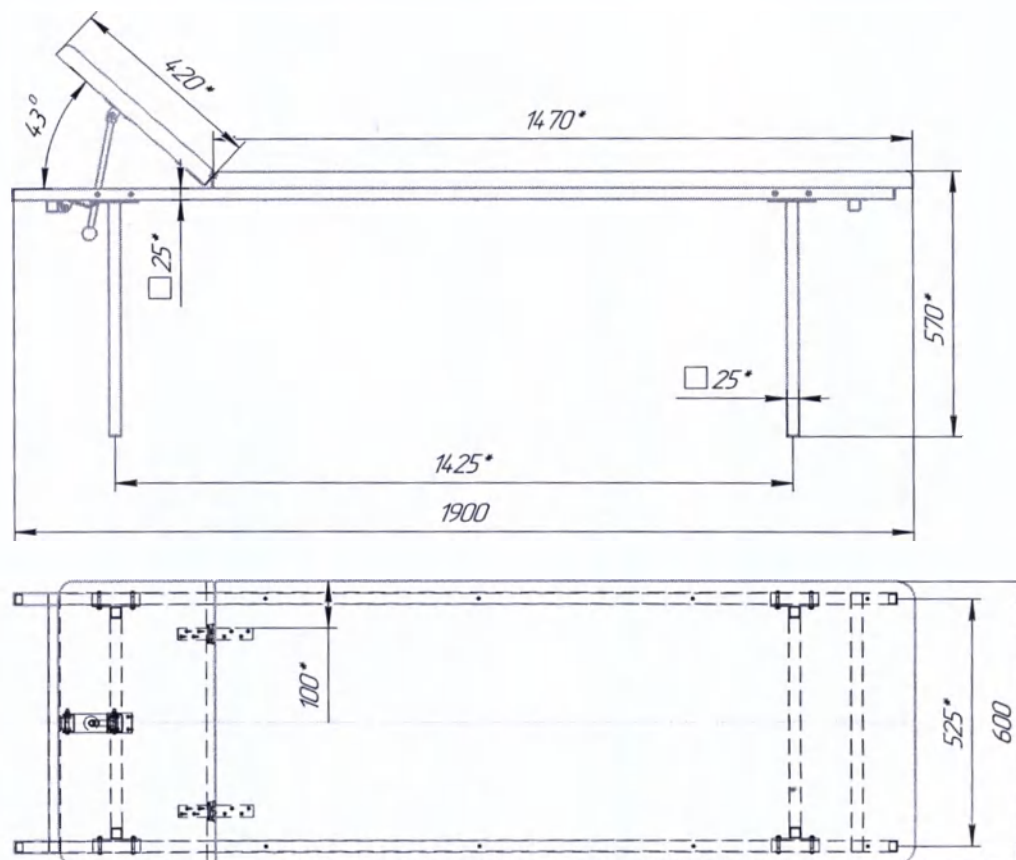

1* Размеры для справок

2 Каркас кушетки изготовлен из металлической трубы квадратного сечения 25x25

Рис.1- Кушетка физиотерапевтическая М 2047-01

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Кушетка массажная М 1025

2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры кушетки указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
	М 1025
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм, (± 10 мм)	2050х700х835
Масса, кг. (± 2 кг)	20

3.2 Характеристики

- Кушетка представляет собой изделие сборно-разборной сварной конструкции. Основными частями конструкции являются: рама квадратного сечения, лежак.
- Лежак кушетки состоит из одной секции - ложа.
- Рама и ножки фиксируются и закрепляются при помощи винтового соединения. Зажим крепится к раме винтовым соединением. Лежак крепится к раме при помощи винтов самонарезающих.
- Кушетка выдерживает номинальную нагрузку массой не более 120 кг.
- Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм.
- Сборочные элементы кушетки, поставляемые потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность кушетки представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение детали	Количество
1.Царга	1 шт.
2.Ножка	2 шт.
3.Ложе	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования кушетку в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать её в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию кушетки. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Распаковать изделие.

- 7.2 Проверить внешнее состояние сборочных узлов и лежака кушетки (см. Приложение);
- 7.3 Уложить на подготовленную поверхность лежак;
- 7.4 К раме прикрепить стойки при помощи винтов М6х60 гаек М6;
- 7.5 К стойкам прикрепить перекладину при помощи винтов М6х60 и гаек М6;
- 7.6 Раму соединить с лежаком саморезов 3,5х40;
- 7.7 Поставить кушетку на ножки.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке кушетки.
- 8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кушетки, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется надежность всех видов соединений и креплений.
- 8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- 9.1 Общие положения:
- 9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.
- 9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:
 - 1) обнаружение неисправностей;
 - 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
 - 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.
- 9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.
- 9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 11.2 Транспортирование кушетки морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.
- 11.3 Условия при транспортировке кушетки соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 11.4 Условия хранения кушетки - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.
- 11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.
- 11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.
- 11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения кушетки в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы кушетки 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет кушетки, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка массажная М 1025, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кушетка массажная М 1025, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакована (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 ____ г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Кушетка массажная М 1025, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____


(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

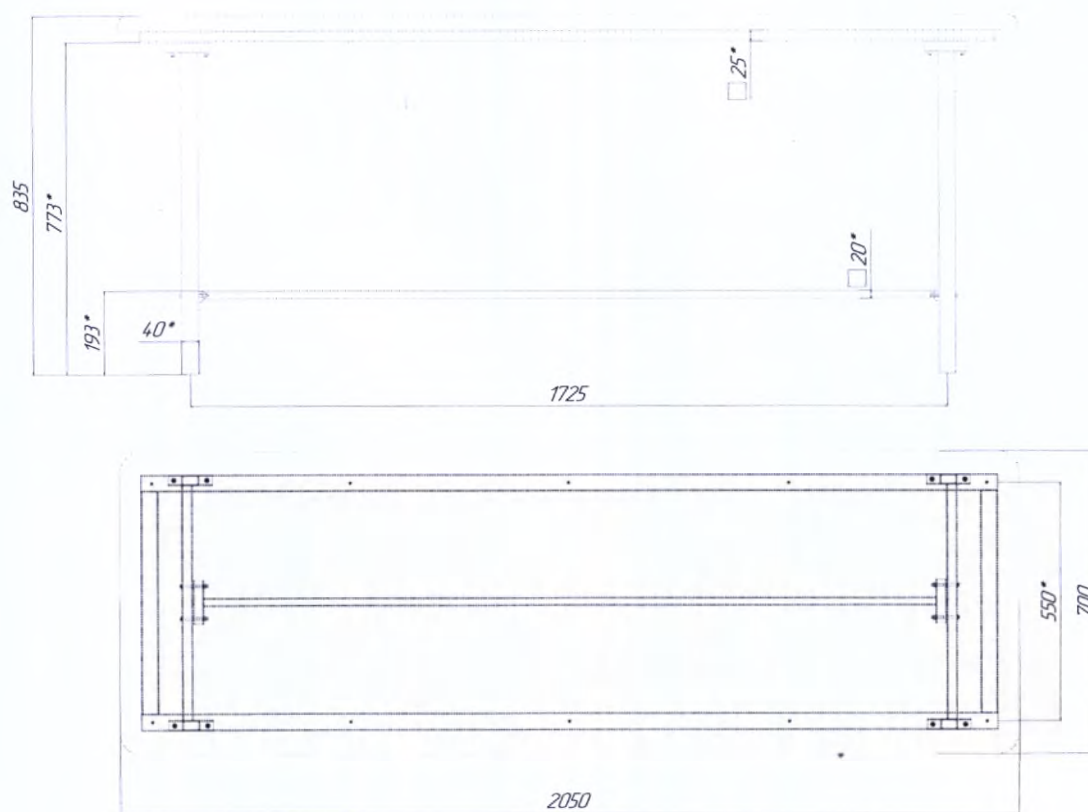

1* Размеры для справок

2. Каркас кушетки изготовлен из металлической трубы квадратного сечения 25х25 и из связующей трубы 20х20. Ножки кушетки изготавливаются из трубы прямоугольного сечения 40х25.

Рис.1-Кушетка массажная М 1025

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Столик манипуляционный (МА 4009,
МБ 4009, МВ 4009, МГ 4009, МД 4009, МЕ 4009)

2021

ОБЩЕЕ

Действие настоящего паспорта распространяется на следующие варианты исполнения:

- Столик манипуляционный МА 4009;
- Столик манипуляционный МБ 4009;
- Столик манипуляционный МВ 4009;
- Столик манипуляционный МГ 4009;
- Столик манипуляционный МД 4009;
- Столик манипуляционный МЕ 4009.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные размеры указаны на таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров					
	МА 4009	МБ 4009	МВ 4009	МГ 4009	МД 4009	МЕ 4009
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	728х455 х935	728х455 х935	728х455 х865	728х455 х865	728х455 х935	728х455 х935
Масса, кг (± 2 кг)	38	23	14	25	29	26

3.2 Характеристики

- Столики манипуляционные представляют собой сварные конструкции из нержавеющей стальной трубы круглого сечения.
- Столик манипуляционный МА 4009 комплектуется следующими узлами: каркас; ящики выдвижные (4 шт.); рамка (1 шт.); полка металлическая (1 шт.).
- Столик манипуляционный МБ 4009 комплектуется следующими узлами: каркас; рамка (3 шт.); полурамка (2 шт.); полка металлическая (3 шт.); полка стеклянная (1 шт.);
- Столик манипуляционный МВ 4009 комплектуется следующими узлами: каркас; рамка (2 шт.); полка металлическая (2 шт.);
- Столик манипуляционный МГ 4009 комплектуется следующими узлами: каркас; ящик выдвижной (1 шт.); рамка (1 шт.); полурамка (4 шт.); полка металлическая (1 шт.); полка стеклянная (2 шт.);
- Столик манипуляционный МД 4009 комплектуется следующими узлами: каркас; ящик выдвижной (1 шт.); рамка (2 шт.); полурамка (2 шт.); полка металлическая (2 шт.); полка стеклянная (1 шт.);
- Столик манипуляционный МЕ 4009 комплектуется следующими узлами: каркас; ящик выдвижной (2 шт.); рамка (1 шт.); полка металлическая (1 шт.).
- Столик установлен на четыре самоориентирующихся колеса, вращающихся вокруг вертикальной оси.
- Колеса столиков должны вращаться свободно, без заедания.
- Столики выдерживают предельную рабочую нагрузку на столешницу - 100 Н (10 кг), на дно ящика, полку 50Н (5 кг), на дополнительную полку 30Н (3кг).
- Усилие, необходимое для перемещения столиков с номинальной нагрузкой не более 50 Н (5 кг), при этом колеса должны быть сориентированы в направлении движения.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение детали	Модели					
Наименование	МА4009	МБ4009	МВ4009	МГ4009	МД4009	МЕ4009
1. Каркас	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2. Ящик выдвижной	4 шт.	-	-	1 шт.	1 шт.	2 шт.
3. Рамка	1 шт.	3 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.
4. Полурамка	-	2 шт.	-	4 шт.	2 шт.	-
5. Полка металлическая	1 шт.	3 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.
6. Полка стеклянная	-	1 шт.	-	2 шт.	1 шт.	-

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации столика допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлечь столик из транспортной тары.

6.2 Проверить комплектность столика.

6.3 После транспортирования столика в условиях отрицательных температур его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 2 часов.

6.4 Провести техническое обслуживание столика согласно разделу № 8 настоящего паспорта.

6.5 Произвести дезинфекцию столика. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

6.6 Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания столика, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Столики манипуляционные поставляются в собранном виде (см. Приложение).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке столика.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования столика, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Содержание текущего ремонта:

1) обнаружение неисправностей;

2) исправление неисправностей;

3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; дефектную ведомость; гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик манипуляционный М__4009, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.) _____

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Столик манипуляционный М__4009, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакован (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) _____

Дата упаковывания « ____ » _____ 20__ г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Столик манипуляционный М__4009, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____

(заполняется заводом-изготовителем)


Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) _____

ПРИЛОЖЕНИЕ

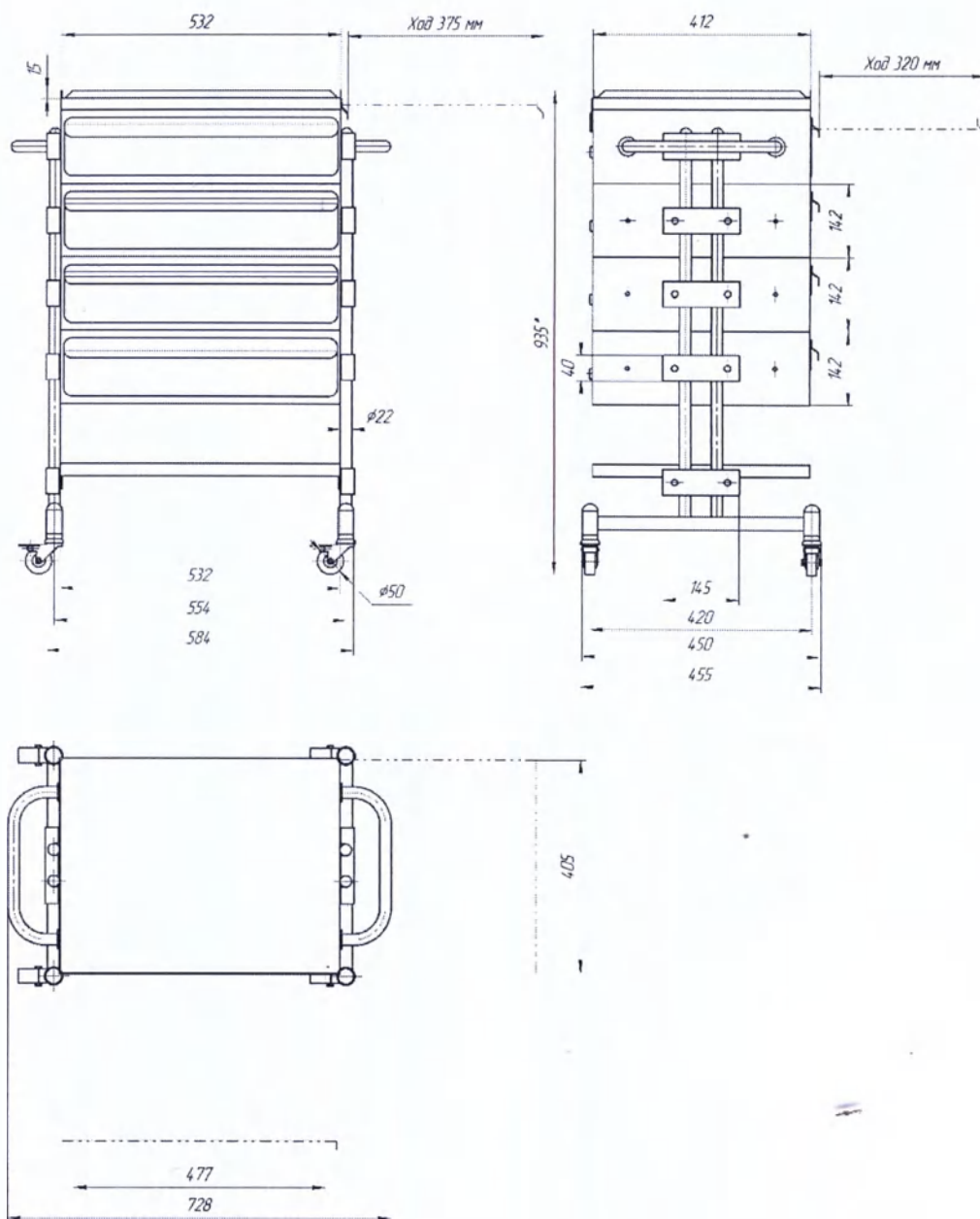

1*. Размеры для справок

Рис. 1- Столик манипуляционный МА 4009

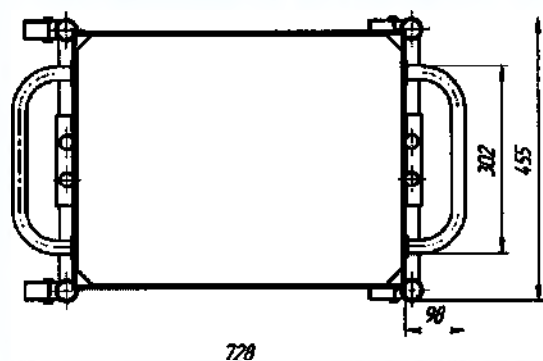
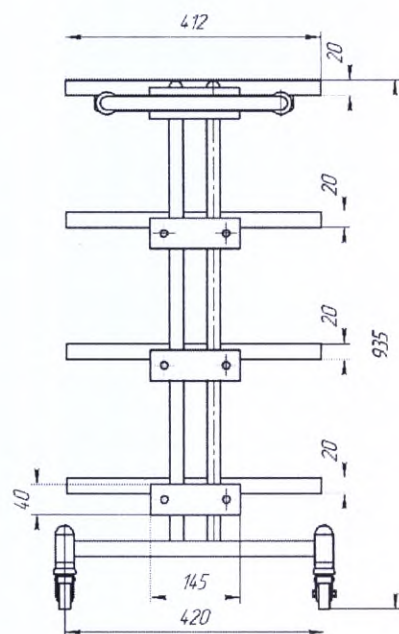
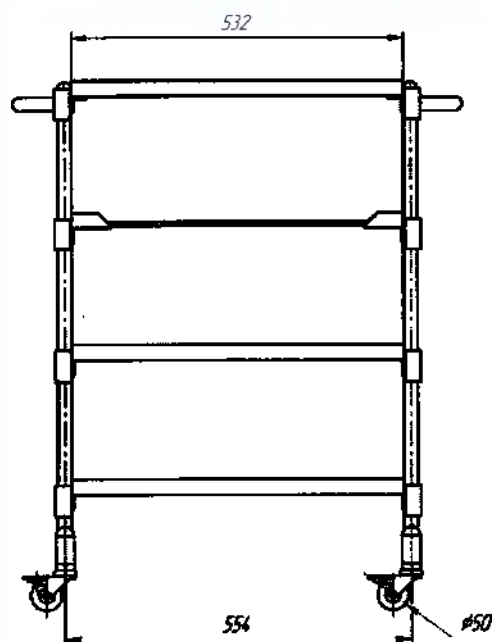


Рис. 2- Столик манипуляционный МБ 4009

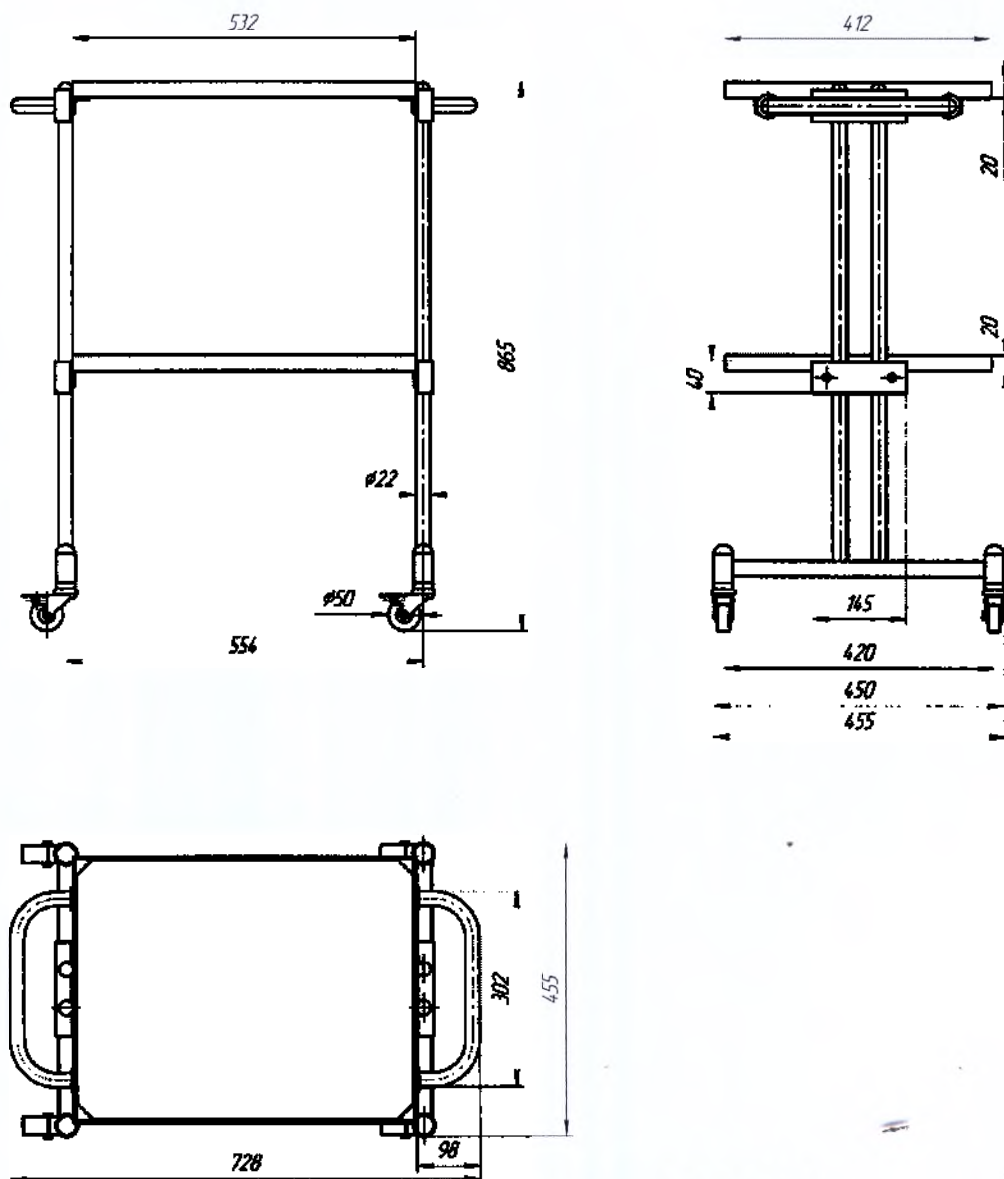


Рис. 3- Столик манипуляционный MB 4009



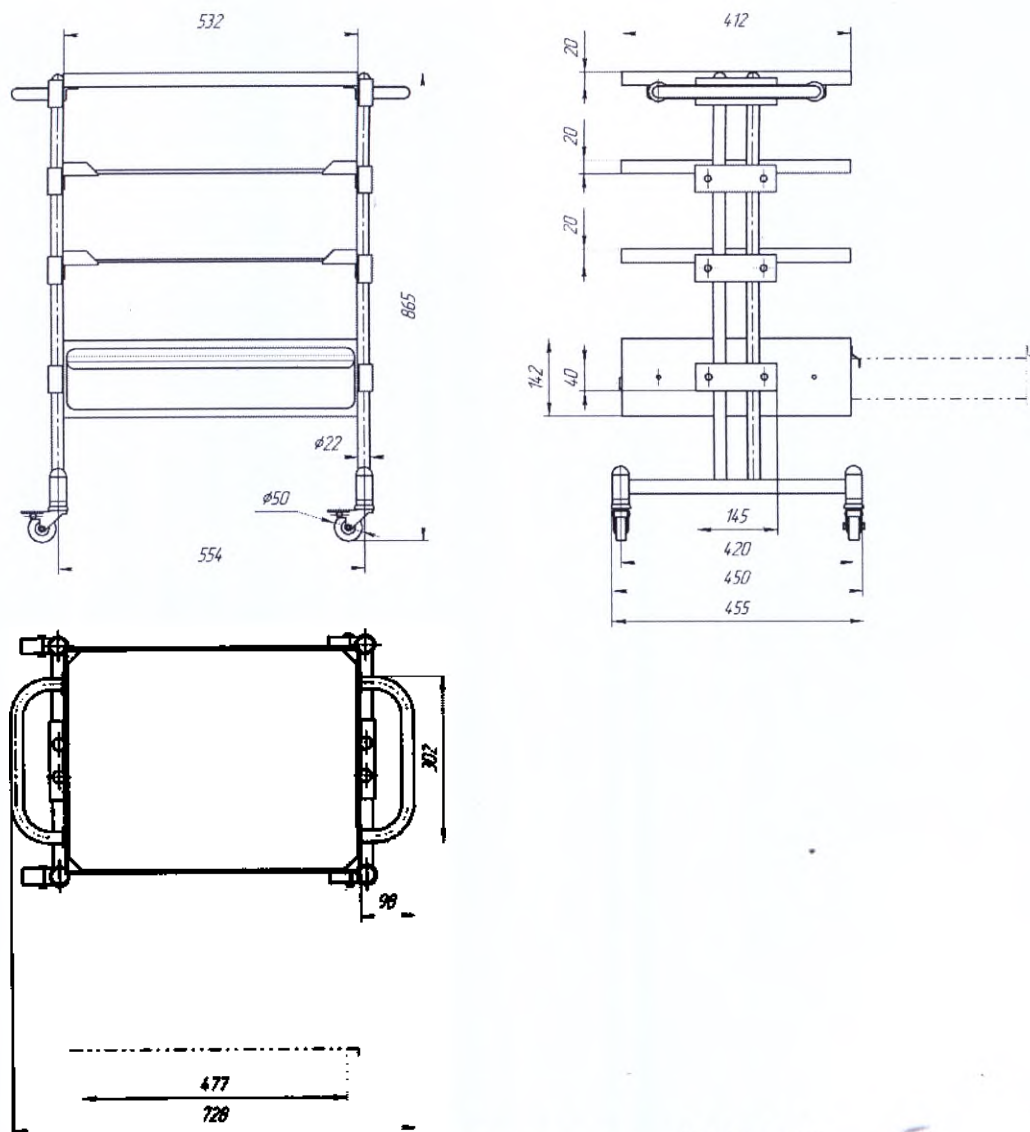


Рис. 4- Столик манипуляционный МГ 4009

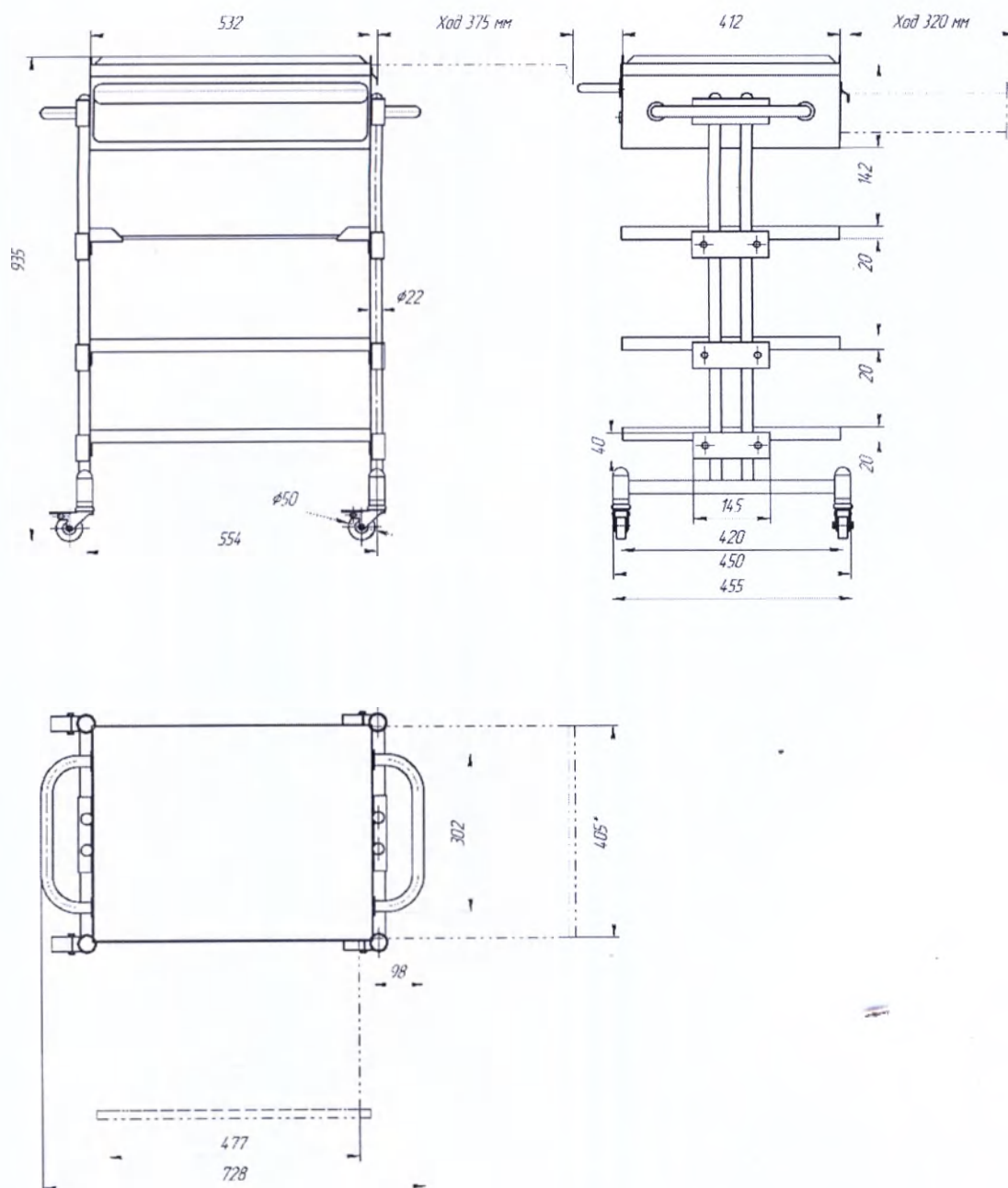

1*. Размеры для справок

Рис. 5- Столик манипуляционный МД 4009

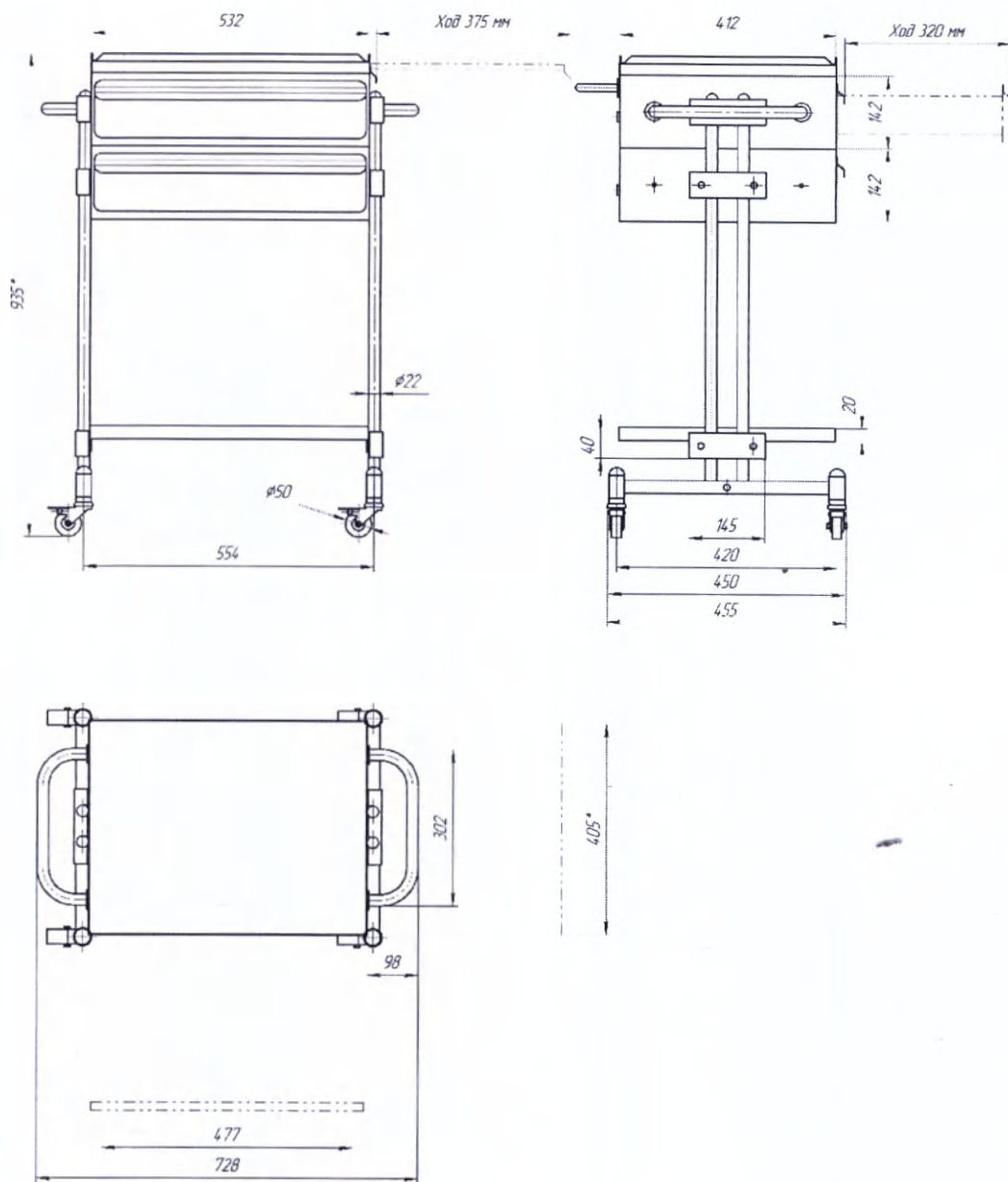

1*. Размеры для справок

Рис. 6 - Столик манипуляционный ME 4009

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Тележка мобильная
транспортировочная ТТМО-01*

2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры тележки указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	650x485x900
Масса, кг (± 1 кг)	8

3.2 Характеристики

- Тележка представляет собой изделие сборно-разборной сварной конструкции. Основными частями конструкции являются: стойка тележки, выполненная из круглой тонкостенной трубы; крышка, поддон и хомут для зажима верхнего края мешка, выполненные из тонколистовой стали.
- Тележка установлена на два колеса, вращающихся вокруг горизонтальной оси.
- Колеса тележки должны вращаться свободно, без заедания.
- Усилие, необходимое для перемещения тележки не более 10 Н (1 кг).
- Равномерно распределённая нагрузка на тележку должна составлять не более 35 кг.
- Тележка должна стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одним из колес должен быть не более 3 мм.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность тележки представлена в таблице 2.

Таблица 2- Тележка мобильная транспортировочная: ТТМО-01;

Обозначение детали	Количество
1.Тележка	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации тележки допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования тележки в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать тележку и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию тележки. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

6.5 Запрещается использование неисправного изделия.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Тележка поставляется в собранном виде (см. Приложение).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Тележка мобильная транспортировочная не требует специального технического обслуживания.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование мебели медицинской морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке мебели медицинской соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения мебели медицинской - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации тележки - не менее 18 месяца со дня ввода его в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы тележки 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет тележку, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО

ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка мобильная транспортировочная ТТМО-01, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тележка мобильная транспортировочная ТТМО-01, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакован (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 ____ г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Тележка мобильная транспортировочная ТТМО-01, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____


(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

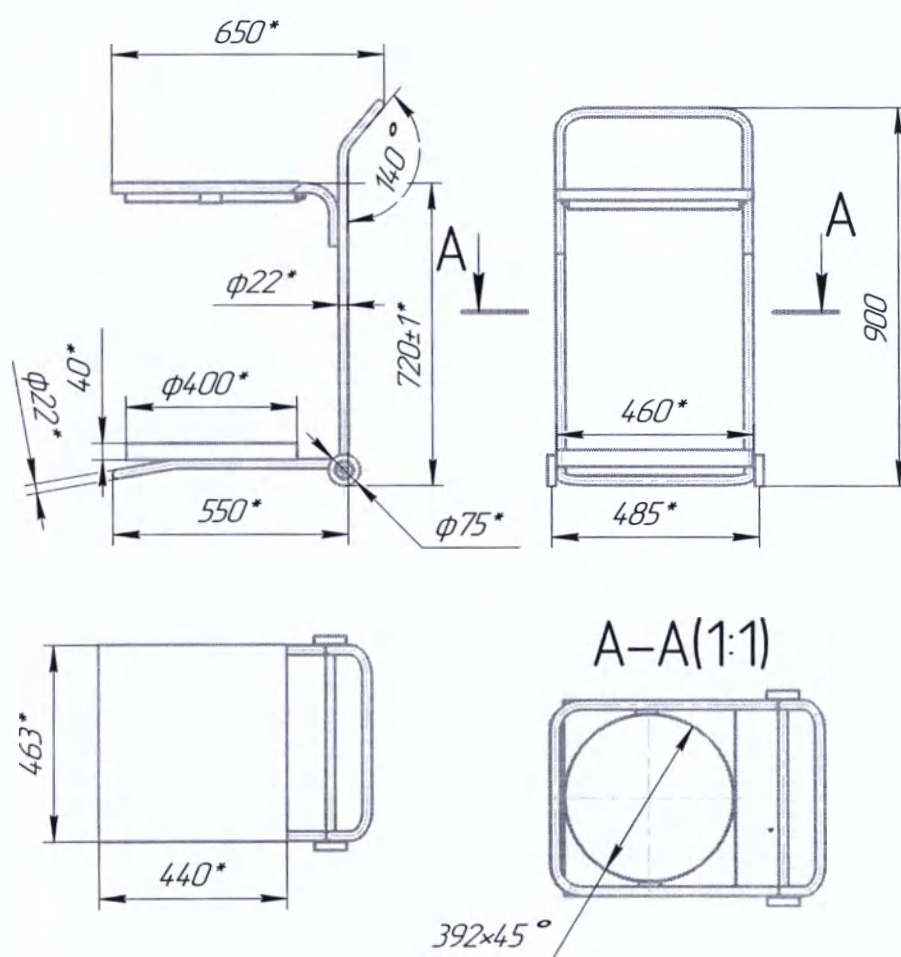

1*. Размеры для справок

Рис.1- Тележка мобильная транспортировочная ТТМО-01

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Матрац
(односекционный М 7005, двухсекционный М 7006).

2021

ОБЩЕЕ

Действие настоящего паспорта распространяется на следующие варианты исполнения:

- Матрац односекционный М 7005;
- Матрац двухсекционный М 7006.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры матрацев указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров	
	М 7005	М 7006
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	2000x900x100	1970x810x100
Масса, кг (± 1 кг)	4,5	4,5

3.2. Характеристики

- Матрац кровати представляет собой беспружинный блок средней жесткости и односторонней мягкости. Основные части конструкции матраца: односпальный беспружинный блок, съемный чехол.
- Матрацы могут быть в двух исполнениях:
 - односекционный (модель М 7005);
 - двухсекционный (модель М 7006).
- Эксплуатационная нагрузка на спальное место не более 110 кг.
- Облицовочный материал матраца на углах должен быть расправлен и зашит нитками, подобранными по цвету.
- На матрацах швы должны быть расположены на боковых сторонах.
- Толщина матраца должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраца до верхнего края ограждения кровати было не менее 500 мм для самого низкого положения матраца и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраца.
- Остаточная деформация беспружинных мягких элементов должна быть не более 10 %.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Матрац: односекционный М 7005, двухсекционный М 7006

Обозначение детали	Количество
1. Основа матраца	1 шт.
2. Чехол	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации матраца допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования матраца в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их при комнатной температуре не менее 2-х часов.

6.2 Распакуйте матрац.

6.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Матрацы поставляются в собранном виде (см. Приложение).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

8.2 Периодический осмотр включает в себя:

- осмотр поверхности матрацев.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование матрацев морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки – контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке матрацев медицинских соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения матрацев медицинских - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие матрацев медицинским требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации матрацев медицинских - не менее 18 месяца со дня ввода его в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения матрацев медицинских в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы матрацев медицинских 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет матрацы медицинские, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Матрацы медицинские М 7005, М 7006, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Матрацы медицинские М 7005, М 7006, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакован (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20 ____ г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Матрацы медицинские М 7005, М 7006, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____


Номер и дата выпуска _____

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____


(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

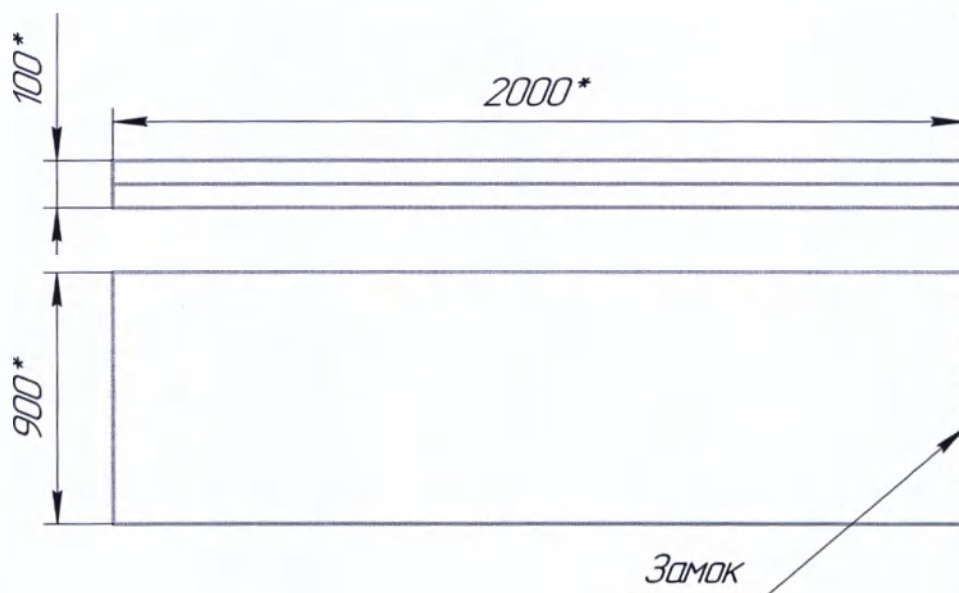

1*. Размеры для справок

Рис.1- Матрац односекционный М 7005

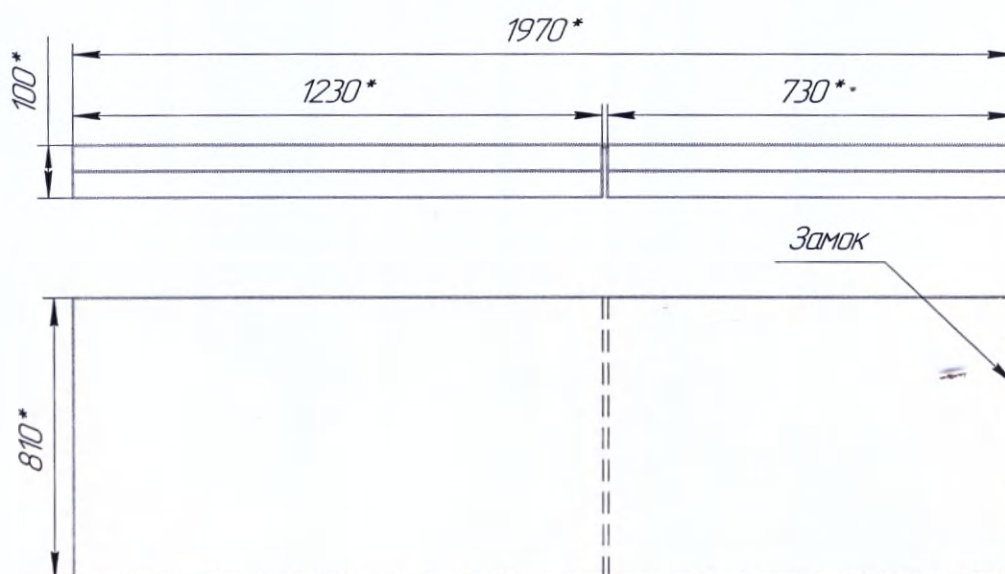

1*. Размеры для справок

Рис.2- Матрац двухсекционный М 7006

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Столик инструментальный М 4025

2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры изделия указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
	М 4025
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	600x500x996
Масса, кг. (± 1 кг)	13

3.2 Характеристики:

- Столик представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из каркаса, двух полок, оснащен ручкой для его перевозки. В основание столика установлены четыре колеса, вращающихся вокруг вертикальной оси, без тормозов.
- Столик должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между одним из колёс и полом не должен быть более 3 мм.
- Столик выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 50 кг. Допустимая нагрузка на полку: 15кг.
- Колеса столика должны вращаться свободно, без заедания.
- Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой не более 150 Н (15 кг), при этом колеса столиков должны быть сориентированы в направлении движения.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение детали	Количество
Столик инструментальный	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации столика допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлечь столик из транспортной тары.

6.2 Проверить комплектность столика.

6.3 После транспортирования столика в условиях отрицательных температур его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 2 часов.

6.4 Провести техническое обслуживание столика согласно разделу № 8 настоящего паспорта.

6.5 Произвести дезинфекцию столика. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

6.6 Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания столика, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Столик инструментальный М 4025 поставляется в собранном виде (см. Приложение).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке мебели медицинской.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования мебели медицинской, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Общие положения:

Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

Содержание текущего ремонта:

Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование столика морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке столика соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения столика - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик инструментальный М 4025, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.) _____

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Столик инструментальный М 4025, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакован (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20__ г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Столик инструментальный М 4025, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____

(заполняется заводом-изготовителем)


Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

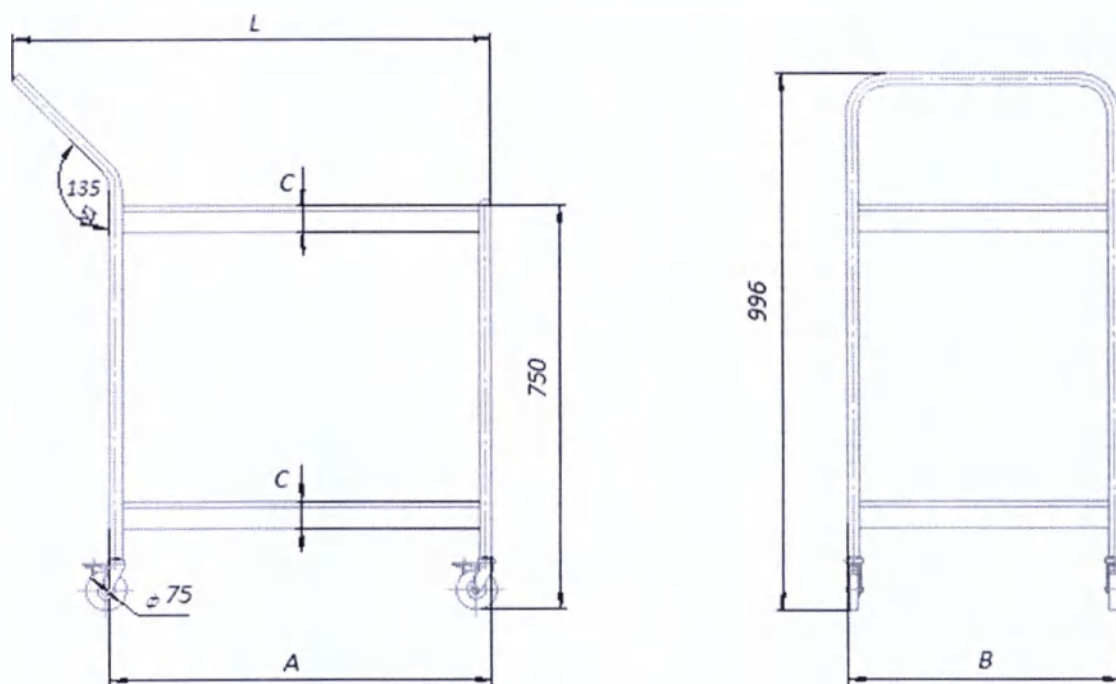

Размеры в мм

A	B	C	L
600	500	30	800

Рис. 1- Столик инструментальный М 4025

Набор мебели медицинской для отделений и палат
по ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Паспорт

Исполнение: Столик инструментальный М 4026

2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от +5 до +40 °С.

Относительная влажность: 20 – 80%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры.

3.1.1 Основные параметры и размеры изделия указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
	М 4026
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (± 10 мм)	655х500х945-1200
Масса, кг. (± 1 кг)	15

3.2 Характеристики

- Столик представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из каркаса, столешницы.
- Столик устанавливается на три самоориентирующихся колеса, вращающихся вокруг вертикальной оси, два из которых оснащены тормозом. Усилие, необходимое для включения тормозной системы должно быть не более 150 Н (15 кг).
- Столик выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 50 кг. Допустимая нагрузка на полку: 15кг.
- Столик должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между одним из колёс и полом не должен быть более 3 мм.
- Колеса столика должны вращаться свободно, без заедания.
- Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой не более 150 Н (15 кг), при этом колеса столиков должны быть сориентированы в направлении движения.
- Регулировка высоты, фиксация столешницы осуществляется с помощью винта с барашком.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение детали	Количество
Столик инструментальный	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации столика допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлечь столик из транспортной тары.

6.2 Проверить комплектность столика.

6.3 После транспортирования столика в условиях отрицательных температур его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 2 часов.

6.4 Провести техническое обслуживание столика согласно разделу № 8 настоящего паспорта.

6.5 Произвести дезинфекцию столика. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

6.6 Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания столика, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Столик инструментальный М 4026 поставляется в собранном виде (см. Приложение).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке мебели медицинской.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования мебели медицинской, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Общие положения:

Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

Содержание текущего ремонта:

Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация мебели медицинской осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Мебель медицинская транспортируется всеми видами крытых транспортных средств и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Транспортирование столика морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

11.3 Условия при транспортировке столика соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.4 Условия хранения столика - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

11.5 В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

11.6 Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

11.7 Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели медицинской требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели медицинской - не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения мебели медицинской в упакованном виде 18 месяцев.

12.4 Средний срок службы мебели медицинской 10 лет.

12.5 В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель медицинскую или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕГО В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПРИ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ ПРИЕМКЕ ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ В АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЗЛМК «ШАНС»

Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17А

Тел.: +79241518796

E-mail: shans-mebel@yandex.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик инструментальный М 4026, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП (подпись) (Ф.И.О.) _____

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Столик инструментальный М 4026, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____, упакован (наименование или шифр предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата упаковывания « ____ » _____ 20__ г.

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

Столик инструментальный М 4026, ТУ 32.50.30-001-10326694-2017

Заводской номер № _____

Номер и дата выпуска _____

(заполняется заводом-изготовителем)


Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

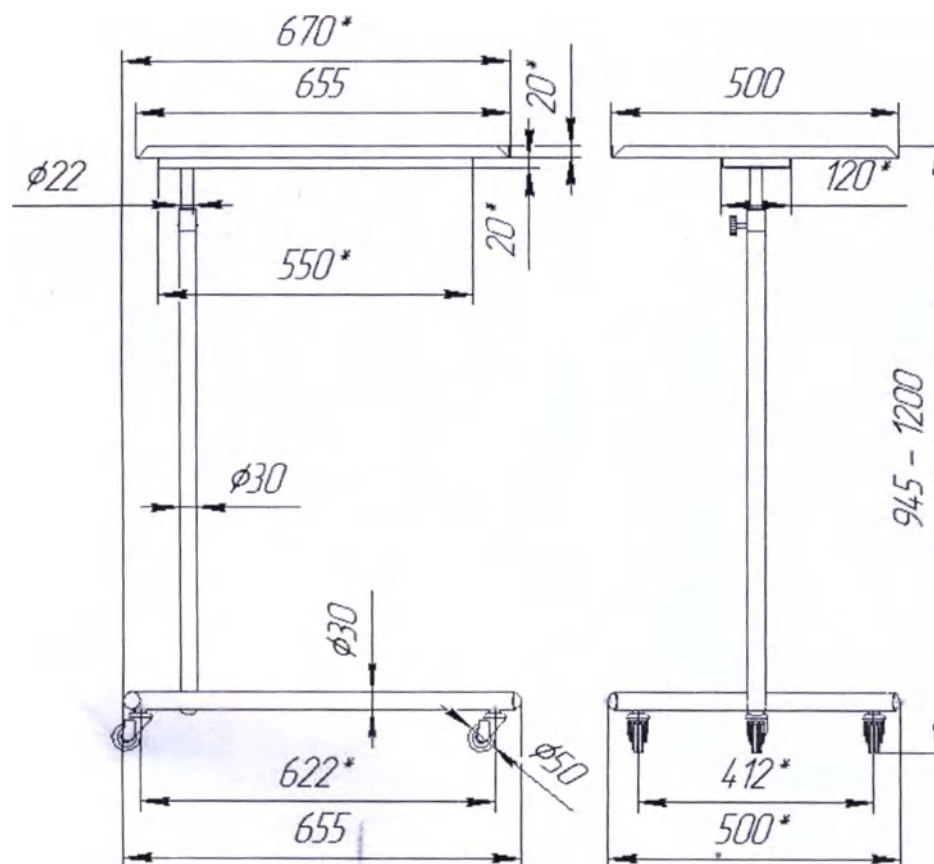

1*. Размеры для справок

Рис. 1- Столик инструментальный М 4026

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

86 (восемьдесят шесть) листов
цифрами прописью

Должность зам. дир.

Подпись [подпись]

« 01 » Сентября 2021

