

«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
« 20 » 04 2021 г.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit»
по ТУ 32.99-048-10614163-2020

ООО «Целит»

Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit»




CELIT
DENTAL
COMPANY


Схема сборки



Стандартное крепление

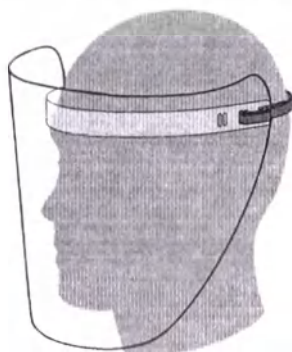


Увеличенное крепление

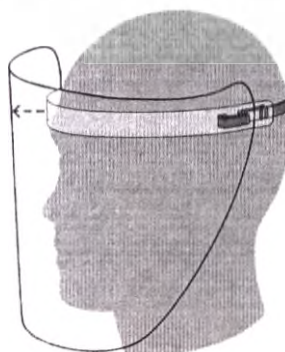

Выберите необходимые отверстия на щитке и налобной ленте



Проденьте резинку через отверстия и потяните, чтобы отрегулировать расстояние.

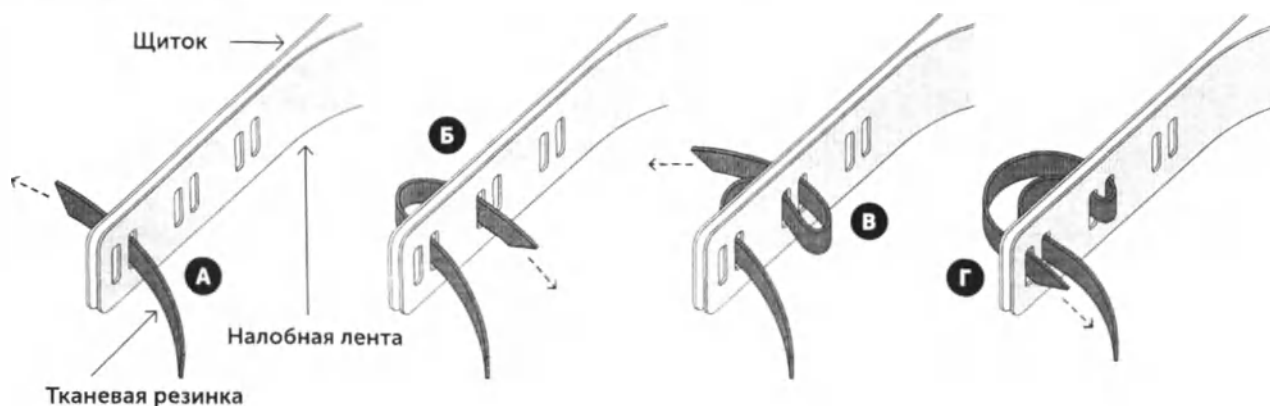

Повторите с другой стороны.

Срок годности: 5 лет.

Партия:

Дата выпуска:



Полная инструкция
на оборотной стороне

Этикетка-инструкция по применению **Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit»** **ТУ 32.99-048-10614163-2020**

Показания к применению

Маска-экран предназначена для эффективной защиты лица, глаз органов дыхания медицинского персонала от прямого попадания мелких частиц пыли, аэрозолей, брызг биологических жидкостей, в условиях медицинского учреждения при выполнении клинических или лабораторных процедур, а также стоматологических и косметологических работ.

Противопоказания к применению

Не используйте как защитное средство для глаз от УФ-излучения.

Меры предосторожности


- Изделие выпускается в нестерильной форме.
- Не используйте изделие без предварительной очистки и дезинфекции.
- Не используйте изделие не по назначению.

Побочные эффекты

До настоящего времени не известны.

Способ применения

Снимите защитную плёнку с обеих сторон щитка и налобной ленты. Выберите необходимые отверстия на щитке и налобной ленте (рис. 1). Проденьте тканевую резинку через отверстия и потяните, чтобы отрегулировать расстояние (рис. 2). Повторите действие с другой стороны. Для дополнительной надёжности зафиксируйте концы тканевой резинки с помощью узлов.

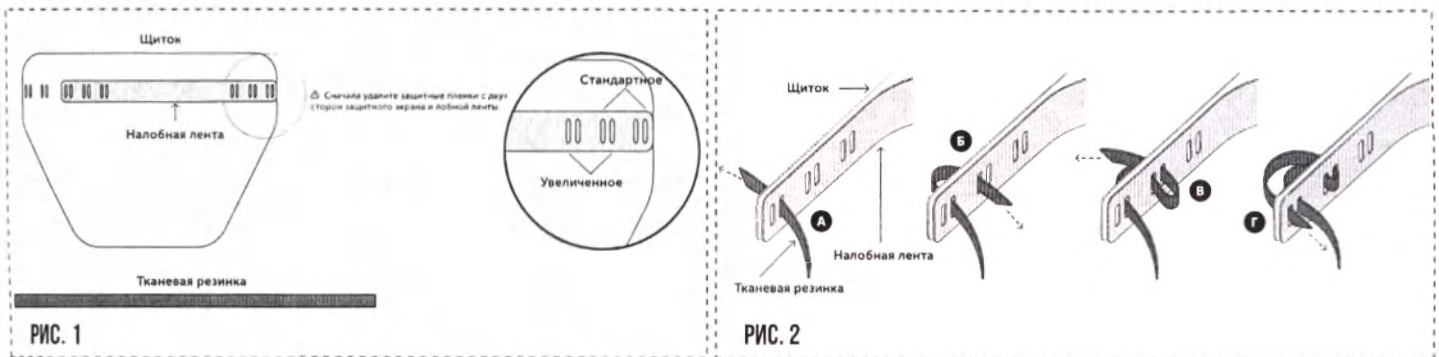

Условия эксплуатации

Эксплуатировать при температуре воздуха от +10° до +45° С и относительной влажности не более 98%.

Методы очистки и дезинфекции

После каждого использования необходимо проводить дезинфекцию маски-экрана. Дезинфекцию проводят путём полного погружения маски-экрана в разобранном виде в дезинфицирующий раствор (перекись водорода концентрацией 3%), время выдержки 80 мин., после обработки промыть проточной водой.

Комплект поставки

Налобная лента - 1 шт.; Щиток - 1 шт.; Этикетка-инструкция по применению - 1 шт.; Тканевая резинка - 1 шт.

Масса и габаритные размеры

Масса: Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit» в сборе - 35±5 г. Габаритные размеры: Налобная лента - длина 260±5 мм, ширина 25±1 мм., Щиток - высота 230±5 мм, длина большего основания 310±5 мм, длина меньшего основания 160±5мм, толщина щитка 0,35±0,15 мм.

Условия транспортирования и хранения

Транспортировать при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98%. Хранить в упакованном виде в помещении, защищенном от атмосферных осадков и прямого солнечного света при температуре от +5° до +40°С и относительной влажности не более 80%.

Гарантия изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие маски-экрана всем требованиям настоящих Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, в течение 5 лет. Гарантийный срок хранения 5 лет со даты выпуска. Номер партии и дата выпуска указаны на оборотной стороне инструкции.

Техническое обслуживание и ремонт

Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit» техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Отходы при использовании изделия в виде пленки и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.27.90-10 класса Б.

Производитель

ООО «Целит», Россия, 394002, г. Воронеж ул. Димитрова, 124И тел. +7 (473) 279-78-87, 237-61-06 E-mail: mail@celit.ru.
 Web: www.celit.ru

Дополнительная информация

Перечень национальных стандартов, применяемых производителем медицинского изделия: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 31508-2012, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14192-96.

Заявления по качеству изделия принимаются по адресу: ООО «Целит», Россия, 394002, г. Воронеж ул. Димитрова, 124И тел. +7 (473) 279-78-87, 237-61-06, E-mail: mail@celit.ru

Дата выпуска или последнего пересмотра этикетки-инструкции по применению (месяц/год): 04.2021

всего прошито и скреплено печатью

3 (три) листа(ов)

Должность Генеральный директор ООО «Целит»

Подпись /М.В. Блажко/

