

Судно типа «Утка»


ТУ 9464-001-12096598-2013



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: ООО «Пластполимер»

Внешний вид и конструкция:

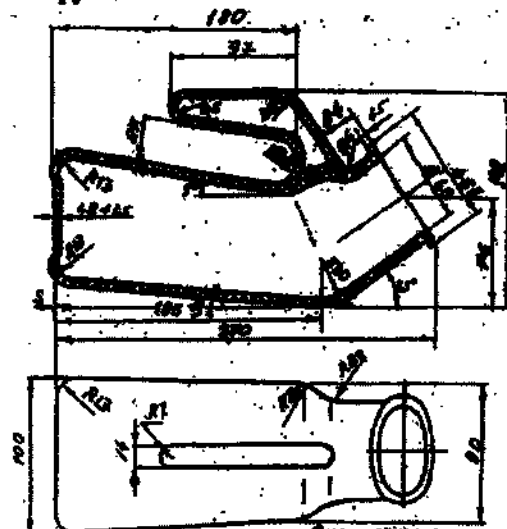

Деталь: 41.000
Вид: 1.000

Назначение: Изделие предназначено для сбора мочи у мужчин при уходе за больными и людьми преклонного возраста.

Материал: полиэтилен

Показание к применению: Предназначено для медицинских и санитарно-гигиенических целей.

Требования к дезинфекции: После применения обрабатывать 3% раствором хлорамина или 3% раствором дихлора-1, или 1% раствором сульфолорантина по ОСТ 42-21-2-85.

Условия хранения: Срок годности не ограничен. Хранить вдали от источников открытого огня, в сухом месте, без прямого солнечного света. Хранить в местах недоступных для детей.

Условия транспортирования: Допускается перевозить любыми видами транспорта. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Запрещается хранить рядом с источниками тепла, токсичными и опасными материалами.

Инструкция по применению:

1. Перед применением больного следует подмыть и высушить.
2. Убедиться в целостности изделия перед применением.
3. У мужчин половые органы и часть мошонки опускаются в изделие. У женщин край резервуара должен обхватывать большие половые губы плотно прилегая к коже.
4. После окончания сбора мочи, изделие снимается. Половые органы обмываются и высушиваются.
5. Отходы сливаются в канализацию.

Текущий ремонт: Изделие не ремонтируется.

Утилизация: В соответствии СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и

удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Судно : 1 шт.

Паспорт изделия: 1 шт.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу:

347913, г. Таганрог Ростовской обл., ул. Химическая, 1, тел. (8634) 38-70-73

Гарантийный срок – 12 мес. со дня реализации через торговую сеть, но не более 15 мес. со дня отгрузки с предприятия. Срок службы изделия не ограничен.

Дата изготовления: _____

Упаковщик: _____ Дата продажи: _____

Насадка

полимерная женская к судну типа «Утка»


ТУ 9464-001-12096598-2013

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: ООО «Пластиполимер»



Внешний вид и конструкция:

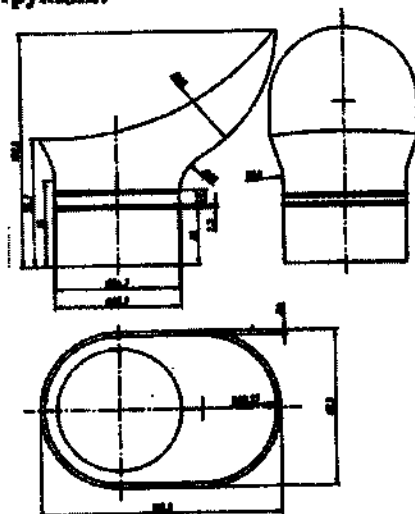

Назначение: Изделие предназначено для применения совместно с судном типа «Утка» сбора мочи у женщин при уходе за больными и людьми преклонного возраста.

Материал: полипропилен.

Показание к применению: Предназначено для медицинских и санитарно-гигиенических целей.

Требования к дезинфекции: Дезинфекция проводится кипячением по ОСТ 42-2.1-2-85

Условия хранения: Срок годности не ограничен. Хранить вдали от источников открытого огня, в сухом месте, без прямого солнечного света. Хранить в местах недоступных для детей.

Условия транспортирования: Допускается перевозить любым видом транспорта. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Запрещается хранить рядом с источниками тепла, токсичными и опасными материалами.

Инструкция по применению:

1. Перед применением большую следует подмыть и высушить.
2. Убедиться в целостности изделия перед применением.
3. Установить насадку на судно типа «Утка».
4. Края насадки должны обхватывать большие половые губы плотно прилегая к коже.
5. После окончания сбора мочи, изделие снимается. Половые органы обмываются и высушиваются.
6. После применения обрабатывать мыльным раствором.
7. Отходы сливаются в канализацию.

Текущий ремонт: Изделие не ремонтируется.

Утилизация: В соответствии СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и

удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Насадка _____ шт.

Паспорт изделия 1 шт.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу:

347913, г. Таганрог Ростовской обл., ул. Химическая, 1, тел. (8634) 38-70-73

Гарантийный срок – 12 мес. со дня реализации через торговую сеть, но не более 15 мес. со дня отгрузки с предприятия. Срок службы изделия не ограничен.

Дата изготовления: _____

Упаковщик: _____ Дата продажи _____

Судно подкладное


ТУ 9464-001-12096598-2018



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: ООО «Пластполимер»

Внешний вид и конструкция:

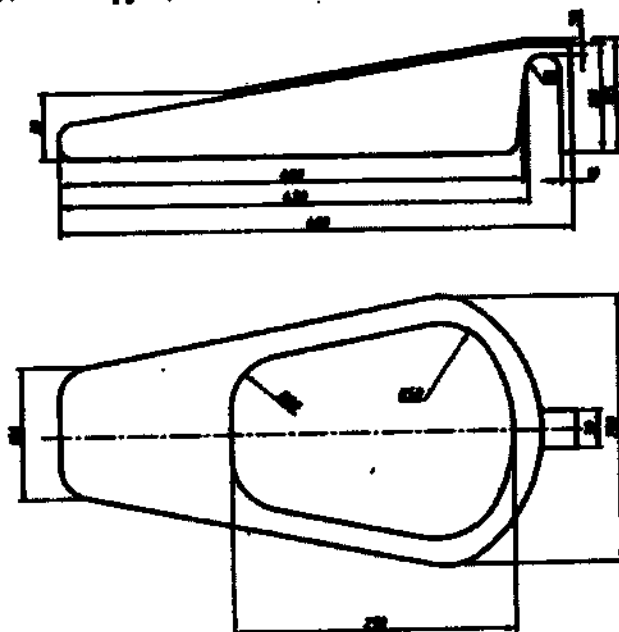

Назначение: Изделие предназначено для сбора испражнений при уходе за больными и людьми преклонного возраста, или проведения клизм в кровати когда больной не может передвигаться самостоятельно.

Материал: полипропилен.

Показание к применению: Предназначено для медицинских и санитарно-гигиенических целей.

Требования к дезинфекции: После применения обрабатывать мыльным раствором.

Условия хранения: Срок годности не ограничен. Хранить вдали от источников открытого огня, в сухом месте, без прямого солнечного света.

Условия транспортирования: Допускается перевозить любым видом транспорта. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Запрещается хранить рядом с источниками тепла, токсичными и опасными материалами.

Инструкция по применению:

1. Перед применением больного следует подмыть и высушить.
2. Убедиться в целостности изделия перед применением. Провести дезинфекцию.
3. Судно помещается под лежащего больного напротив заднего прохода.
4. После окончания сбора испражнений. Больной подмывается и высушивается.
5. Отходы сливаются в канализацию.

Текущий ремонт: Изделие не ремонтируется.

Утилизация: В соответствии СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и

удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Судно 1 шт.

Паспорт изделия

1 шт.

Претензии по качеству в течение гарантийного срока направлять по адресу:

347913, г. Таганрог Ростовской обл., ул. Химическая, 1, тел. (8634) 38-70-73

Гарантийный срок – 12 мес. со дня реализации через торговую сеть, но не более 15 мес. со дня отгрузки с предприятия. Срок службы изделия не ограничен.

Дата изготовления:

Упаковщик:

Дата продажи

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
СВЯЗЕНО ПЕЧАТЬЮ

ЛИСТОВ(А)

