

«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»

М.В. Блажко

« 30 » 09 2020г.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Паста полировальная стоматологическая для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов, коронок и мостов из благородных и неблагородных сплавов «Policron-classic»

по ТУ 9391-036-10614163-2003.

Этикетка-инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов, коронок и мостов из благородных и неблагородных сплавов «Policron-classic».

ТУ 9391-036-10614163-2003

ПУ № ФСР 2008/01641 от 07.02.2008 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Policron-classic» предназначена для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов, коронок и мостов из благородных и неблагородных сплавов в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Policron-classic» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме.

«Policron-classic» представляет собой твёрдую, однородную пасту зелёного цвета, состоящую из тонкого абразивного материала с помощью которого осуществляется полировка поверхности до зеркального блеска и добавок, предотвращающих разбрызгивание пасты.

Способ применения

Нанесите пасту равномерным слоем на всю рабочую поверхность войлочного диска или щётки, полировку производите на низких оборотах мотора (до 1500 об/мин) с небольшой нагрузкой на поверхность протеза, до появления блеска полируемой поверхности.

Протрите поверхность чистой салфеткой и проверьте, заполированы ли все следы шлифования. При необходимости, полировку проведите повторно.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

1. Паста массой (50±5) г в банке полимерной, с этикеткой-инструкцией;
2. Паста массой (100±10) г, обёрнутая бумагой, с этикеткой-инструкцией;
3. Паста массой (250±10) г, обёрнутая бумагой, с этикеткой-инструкцией.

Форма выпуска указаны на упаковке.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98 %.

Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок годности 5 лет с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

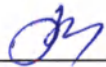
Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394002 г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел.+7 (473) 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06, www.celit.ru

Подготовил:

Главный технолог ООО «Целит»  Е.В. Попова

3 (три)

листа(ов)

Должность Генеральный директор ООО «Целит»

Подпись /М.В. Блажко/



«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
«09» 2020г.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Паста полировальная стоматологическая для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов,
коронки и мостов из благородных и неблагородных сплавов «Policron-extra»

по ТУ 9391-036-10614163-2003.

Этикетка-инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов, коронок и мостов из благородных и неблагородных сплавов «Policron-extra».

ТУ 9391-036-10614163-2003

ПУ № ФСР 2008/01641 от 07.02.2008 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Policron-extra» предназначена для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов, коронок и мостов из благородных и неблагородных сплавов в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Policron-extra» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме.

«Policron-extra» представляет собой твёрдую, однородную пасту, состоящую из тонкого абразивного материала белого цвета и полимерных добавок, предотвращающих разбрызгивание пасты.

Паста «Policron-extra» превосходно очищает и полирует поверхности зубных протезов из золота, нержавеющей стали, кобальт-хромовых сплавов до зеркального блеска.

Способ применения

Нанесите пасту равномерным слоем на всю рабочую поверхность войлочного диска или щётки, полировку производите на низких оборотах мотора (до 1500 об/мин) с небольшой нагрузкой на поверхность протеза, до появления блеска полируемой поверхности.

Протрите поверхность чистой салфеткой и проверьте, заполированы ли все следы шлифования. При необходимости, полировку проведите повторно.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

1. Паста массой (50±5) г в банке полимерной, с этикеткой-инструкцией;
2. Паста массой (100±10) г, обернутая бумагой, с этикеткой-инструкцией;
3. Паста массой (250±10) г, обернутая бумагой, с этикеткой-инструкцией.

Форма выпуска указаны на упаковке.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98 %.

Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключая попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок годности 5 лет с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковка пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394002 г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел.+7 (473) 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06, www.celit.ru

Подготовил:

Главный технолог ООО «Целит»  Е.В. Попова

3 (три) листа(ов)
должность Генеральный директор ООО «Целит»
подпись /М.В. Блажко/



«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит» М.В. Блажко
«30» 09 2020г.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Паста полировальная стоматологическая для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из
пластмасс всех видов «Polir Pro»

по ТУ 9391-036-10614163-2003.

Этикетка-инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из пластмасс всех видов «Polir Pro».

ТУ 9391-036-10614163-2003

ПУ № ФСР 2008/01641 от 07.02.2008 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Polir Pro» предназначена для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из пластмасс всех видов в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Polir Pro» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме.

«Polir Pro» представляет собой твёрдую, однородную пасту светло-серого цвета, состоящую из тонкого абразивного материала с помощью которого осуществляется полировка поверхности до зеркального блеска и добавок, предотвращающих разбрызгивание пасты.

Способ применения

Нанесите пасту равномерным слоем на всю рабочую поверхность войлочного диска или щётки, полировку производите на низких оборотах мотора (до 1500 об/мин) с небольшой нагрузкой на поверхность протеза, до появления блеска полируемой поверхности.

Протрите поверхность чистой салфеткой и проверьте, заполированы ли все следы шлифования. При необходимости, полировку проведите повторно.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

1. Паста массой (50 ± 5) г в банке полимерной, с этикеткой-инструкцией;
2. Паста массой (100 ± 10) г, обёрнутая бумагой, с этикеткой-инструкцией;
3. Паста массой (250 ± 10) г, обёрнутая бумагой, с этикеткой-инструкцией.

Форма выпуска указана на упаковке.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключая попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок годности 5 лет с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

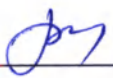
Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394002 г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел.+7 (473) 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06, www.celit.ru

Подготовил:

Главный технолог ООО «Целит»  Е.В. Попова

3 (три) _____ листа(ов)
Должность _____ Генеральный директор ООО «Целит»
Подпись _____ /М.В. Блажко/





«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
30 » 09 2020г.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Паста полировальная стоматологическая с алмазным наполнителем для зеркальной полировки
поверхностей зубных протезов из керамических материалов «Polir Diamant-wax»

по ТУ 9391-036-10614163-2003.

Инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая с алмазным наполнителем для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов «Polir Diamant-wax»

ТУ 9391-036-10614163-2003

РУ № ФСР 2008/01641 от 07.02.2008 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-wax» с алмазным наполнителем предназначена для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-wax» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме.

«Polir Diamant-wax» представляет собой твёрдую, однородную пасту серого цвета, состоящую из тонкого алмазного абразивного материала с помощью которого осуществляется полировка поверхности до зеркального блеска и добавок, предотвращающих разбрызгивание пасты.

Способ применения

Закрепите войлочный диск для полировки при помощи винта в дискодержатель, вставьте дискодержатель в зуботехнический наконечник бормашины. Нанесите пасту равномерным слоем на всю рабочую поверхность войлочного диска, полировку проводите со скоростью не более 7000 об/мин. при равномерной силе нажима на полирующую поверхность. Протрите поверхность чистой салфеткой. При необходимости, проведите полировку повторно.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

Паста массой (10 ± 1) г в банке полимерной.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок годности 5 лет с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394002 г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел.+7 (473) 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06, www.celit.ru

Подготовил:

Главный технолог ООО «Целит»  Е.В. Попова

3 (три)

листа(ов)

Должность Генеральный директор ООО «Целит»

Подпись /М.В. Блажко/





«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
«09» 2020г.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Паста полировальная стоматологическая с алмазным наполнителем для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов «Polir Diamant-soft»

по ТУ 9391-036-10614163-2003.

Инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая с алмазным наполнителем для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов «Polir Diamant-soft»

ТУ 9391-036-10614163-2003

РУ № ФСР 2008/01641 от 07.02.2008 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-soft» с алмазным наполнителем предназначена для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-soft» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме.

«Polir Diamant-soft» представляет собой пластичную, однородную пасту серого цвета, состоящую из тонкого алмазного абразивного материала с помощью которого осуществляется полировка поверхности до зеркального блеска и полимерных водорастворимых добавок, предотвращающих разбрызгивание пасты.

Способ применения

Закрепите войлочный диск для полировки при помощи винта в дискодержатель, вставьте дискодержатель в зуботехнический наконечник бормашины. Нанесите пасту равномерным слоем на всю рабочую поверхность войлочного диска, полировку проводите со скоростью не более 7000 об/мин. при равномерной силе нажима на полирующую поверхность. Протрите поверхность чистой салфеткой или промойте проточной водой. При необходимости, проведите полировку повторно.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

Паста массой (10 ± 1) г в шприце.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключая попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок годности 5 лет с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

ста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

статки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394002 г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел.+7 (473) 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06, www.celit.ru

Подготовил:

Главный технолог ООО «Целит»  Е.В. Попова

3/три

листа(ов)

Должность Генеральный директор ООО «Целит»

Подпись /М.В. Блажко/



«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
« 09 » 2020г.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Паста полировальная стоматологическая с алмазным наполнителем для зеркальной полировки
поверхностей зубных протезов из керамических материалов «Polir Diamant-felt»

по ТУ 9391-036-10614163-2003.

Инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая с алмазным наполнителем для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов «Polir Diamant-felt»

ТУ 9391-036-10614163-2003

ПУ № ФСР 2008/01641 от 07.02.2008 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-felt» с алмазным наполнителем предназначена для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-felt» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме.

«Polir Diamant-felt» представляет собой войлочные диски, пропитанные алмазной пастой. За счёт оптимального сочетания войлочного диска с тонким алмазным абразивным материалом осуществляется полировка поверхности зубных протезов из керамических материалов до зеркального блеска.

Способ применения

Закрепите войлочный диск при помощи винта в дискодержатель, вставьте дискодержатель в зуботехнический наконечник бормашины, полировку проводите со скоростью не более 15000 об/мин. при равномерной силе нажима на полирующую поверхность.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

1. Войлочные диски, пропитанные пастой - 50 шт., дискодержатель - 2 шт., в коробке полимерной;
2. Войлочные диски, пропитанные пастой не более 20 шт., дискодержатель – 1 шт., в пакете полимерном.

Форма выпуска указана на упаковке.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок годности 5 лет с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394002 г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел.+7 (473) 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06, www.celit.ru

Подготовил:

Главный технолог ООО «Целит»  Е.В. Попова

3/тмц _____ листа(ов)
Должность Генеральный директор ООО «Целит»
Подпись _____ /М.В. Блажко/



«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
«30» 09 2020г.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Паста полировальная стоматологическая для финишной полировки поверхностей композитных реставраций зубов и виниров «Brilliance Comp»

по ТУ 9391-036-10614163-2003.

Инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая для финишной полировки поверхностей композитных реставраций зубов и виниров «Brilliance Comp»

ТУ 9391-036-10614163-2003

ПУ № ФСР 2008/01641 от 07.02.2008 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Brilliance Comp» предназначена для финишной полировки поверхностей композитных реставраций зубов светового, химического отверждения и виниров в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Brilliance Comp» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме, представляет собой пластичную, однородную пасту светло-серого цвета.

В состав пасты «Brilliance Comp» входят тонкий алмазный абразивный материала с помощью которого осуществляется финишная полировка, а также полимерные водорастворимые добавки, которые предотвращают разбрызгивание пасты.

Способ применения

Для полировки поверхности композитных реставраций зубов и виниров используйте полировальные чашки или полировальные щётки. Закрепите полировальную чашку или полировальную щётку в угловой зуботехнический наконечник бормашины, нанесите пасту на рабочую поверхность полировальной чашки или полировальной щётки, полировку проводите со скоростью не более 7000 об/мин. при равномерной силе нажима на полирующую поверхность. Остатки пасты смойте водой.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

Паста массой $(4 \pm 0,5)$ г в шприце.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключая попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок годности 3 года с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

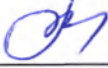
Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394002 г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел.+7 (473) 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06, www.celit.ru

Подготовил:

Главный технолог ООО «Целит»  Е.В. Попова

3/три

листа(ов)

Должность Генеральный директор ООО «Целит»
Подпись /М.В. Блажко/



«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
М.В. Блажко
09 2020г.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Паста полировальная стоматологическая для профессиональной гигиенической чистки и полировки
поверхностей зубов «Polir Clean»

по ТУ 9391-036-10614163-2003.

Инструкция по применению
Паста полировальная стоматологическая для профессиональной гигиенической чистки и полировки
поверхностей зубов «Polir Clean»
ТУ 9391-036-10614163-2003
РУ № ФСР 2008/01641 от 07.02.2008 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Polir Clean» предназначена для профессиональной гигиенической чистки и полировки поверхностей зубов: финишной обработки после удаления зубных отложений, удаления пятен от пищи и табака. Применяется в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Polir Clean» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме, представляет собой пластичную, однородную пасту розового цвета. В состав пасты «Polir Clean» входят тонкий абразивный материал на основе силиката циркония с помощью которого осуществляется чистка и полировка поверхности зубов без повреждения эмали зубов, а также полимерные водорастворимые добавки, которые предотвращают разбрызгивание пасты.

Способ применения

Для полировки поверхности зубов используйте полировальные чашки или полировальные щётки. Закрепите полировальную чашку или полировальную щётку в угловой зуботехнический наконечник бормашины, нанесите пасту на рабочую поверхность полировальной чашки или полировальной щётки, полировку проводите со скоростью не более 7000 об/мин. при равномерной силе нажима на полирующую поверхность зубов. Остатки пасты с поверхности зубов смойте водой.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

Паста массой (45±5) г в банке полимерной.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98 %.

Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Срок годности 3 года с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

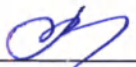
Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394002 г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел.+7 (473) 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06, www.celit.ru

Подготовил:

Главный технолог ООО «Целит»  Е.В. Попова

3 (три) листа(ов)
Должность Генеральный директор ООО «Целит»
Подпись /М.В. Блажко/

