

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ПАС»

А.С. Попов



Март 2021 г.

**Проект этикетки
медицинского изделия**

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС»
по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021**

АПТЕЧКА

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24-004-72225532-2021**
Комплектация аптечки соответствует Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
№1080н от 08 октября 2020г

Изготовитель: ООО «ПАС», Россия, 443070, г.Самара, ул.Верхне-Карьерная, д.3А, ком. 5. Тел. (846)201-69-10

Номер партии: _____ Дата изготовления: _____ Срок годности: _____

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/07285 от _____

Штамп ОТК: _____

Номер или фамилия упаковщика: _____

Условия хранения: Аптечки должны храниться в сухих, чистых закрытых помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность медицинских изделий по группе 1Л ГОСТ 15150-69 (от +5°C до + 40°C)

Условия транспортирования: Аптечка транспортируется всеми видами транспорта, обеспечивающем сохранность аптечки и защиту от атмосферных воздействий по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (от -50°C до + 50°C)

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации аптечки должны соответствовать климатическому исполнению У категории 2 по ГОСТ 15150-69 при воздействии температуры воздуха от - 25°C до + 40°C и влажности воздуха 100% при температуре + 25°C

Условия утилизации:

1. Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10
2. Использованные по назначению вложения аптечки, не контактирующие с биологическими жидкостями, а также не использованные по назначению вложения аптечки относят к отходам класса А. Использованные по назначению вложения аптечки, контактирующие с биологическими жидкостями, например, кровью, относят к отходам класса Б.
3. Аптечка с истекшим сроком годности утилизируется вместе с бытовыми отходами.

Сшито и заверено печатью 2
(два) лист 7

ООО «ПАС»
Директор
Попов А.С.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ПАС»


А.С. Попов
 "ПАС"  2021 г.

**Фотографическое изображение
медицинского изделия**

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС»
по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021**

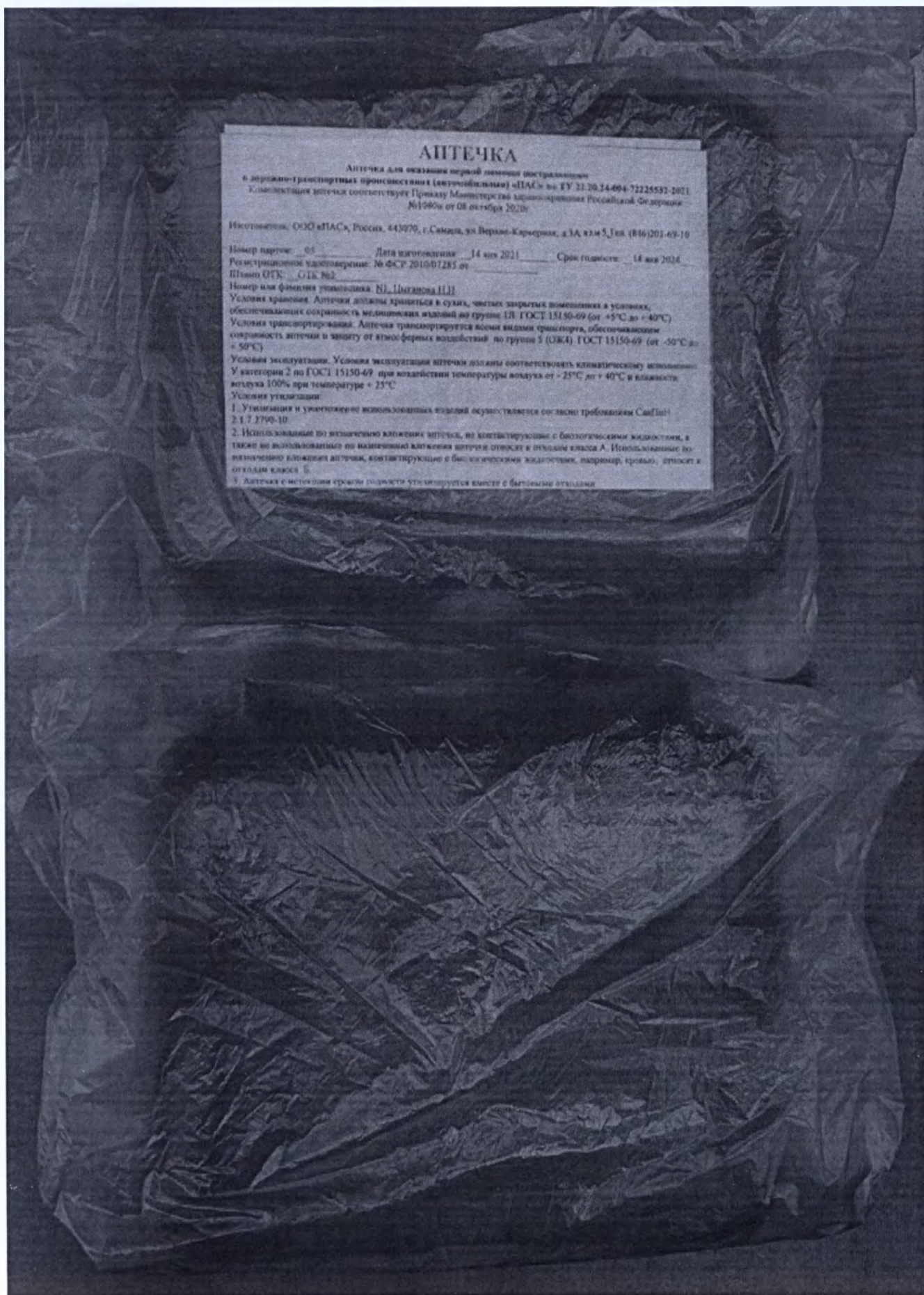


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021 - футляр в индивидуальном пакете

АПТЕЧКА

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24-004-72225532-2021
Комплектация аптечки соответствует Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
№1080н от 08 октября 2020г

Изготовитель: ООО «ПАС», Россия, 443070, г.Самара, ул.Верхне-Карьерная, д.3А, ком. 5. Тел. (846)201-69-10

Номер партии: 05 Дата изготовления: 14 янв 2021 Срок годности: 14 янв 2024

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/07285 от _____

Штамп ОТК: ОТК №2

Номер или фамилия упаковщика: №1, Цыганова Н.Н

Условия хранения: Аптечки должны храниться в сухих, чистых закрытых помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность медицинских изделий по группе 1Л ГОСТ 15150-69 (от +5°C до +40°C)

Условия транспортирования: Аптечка транспортируется всеми видами транспорта, обеспечивающем сохранность аптечки и защиту от атмосферных воздействий по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (от -50°C до +50°C)

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации аптечки должны соответствовать климатическому исполнению У категории 2 по ГОСТ 15150-69 при воздействии температуры воздуха от -25°C до +40°C и влажности воздуха 100% при температуре +25°C

Условия утилизации:

1. Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.
2. Использованные по назначению вложения аптечки, не контактирующие с биологическими жидкостями, а также не использованные по назначению вложения аптечки относят к отходам класса А. Использованные по назначению вложения аптечки, контактирующие с биологическими жидкостями, например, кровью, относят к отходам класса Б.
3. Аптечка с истекшим сроком годности утилизируется вместе с бытовыми отходами.

Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24-004-72225532-2021
- этикетка

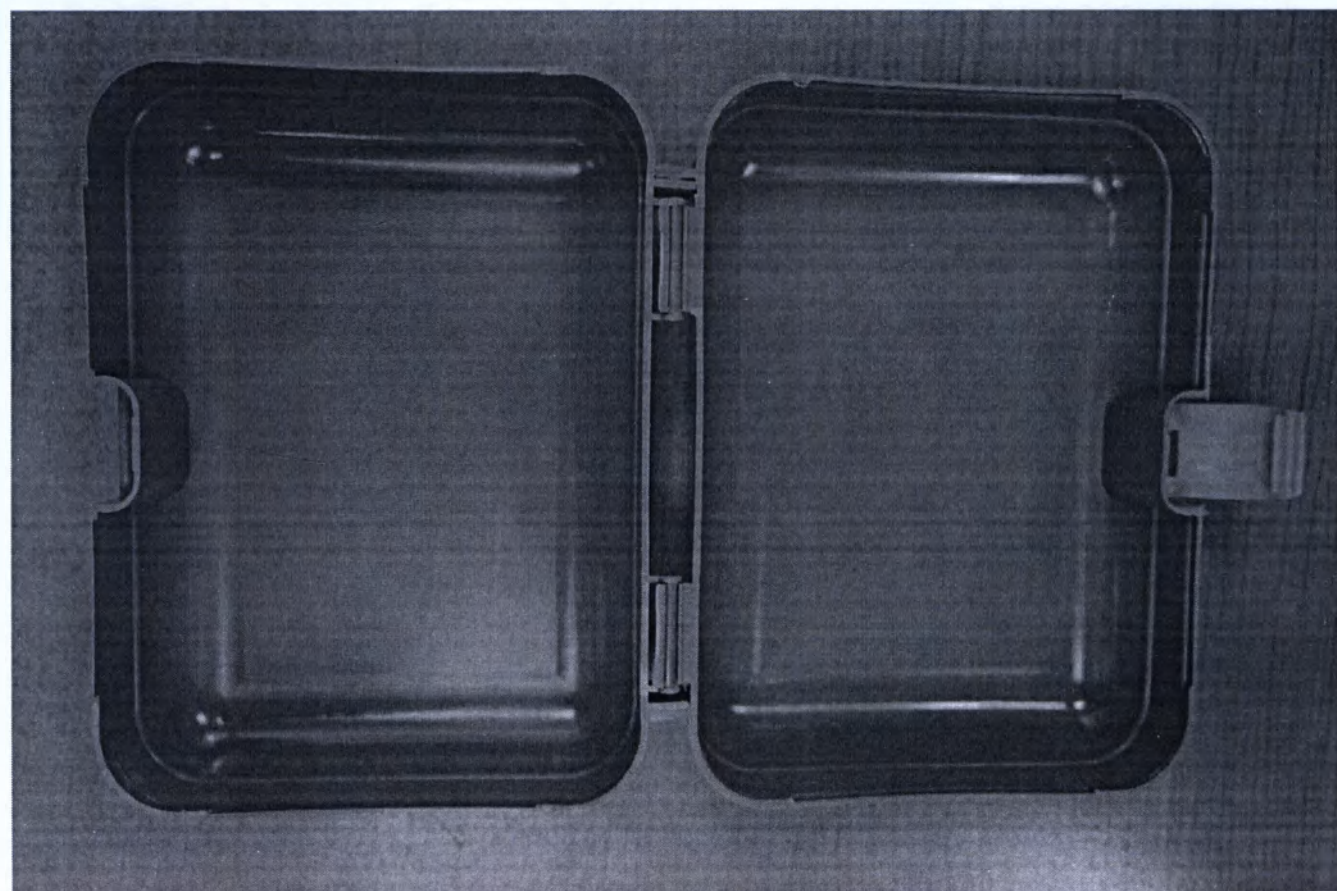
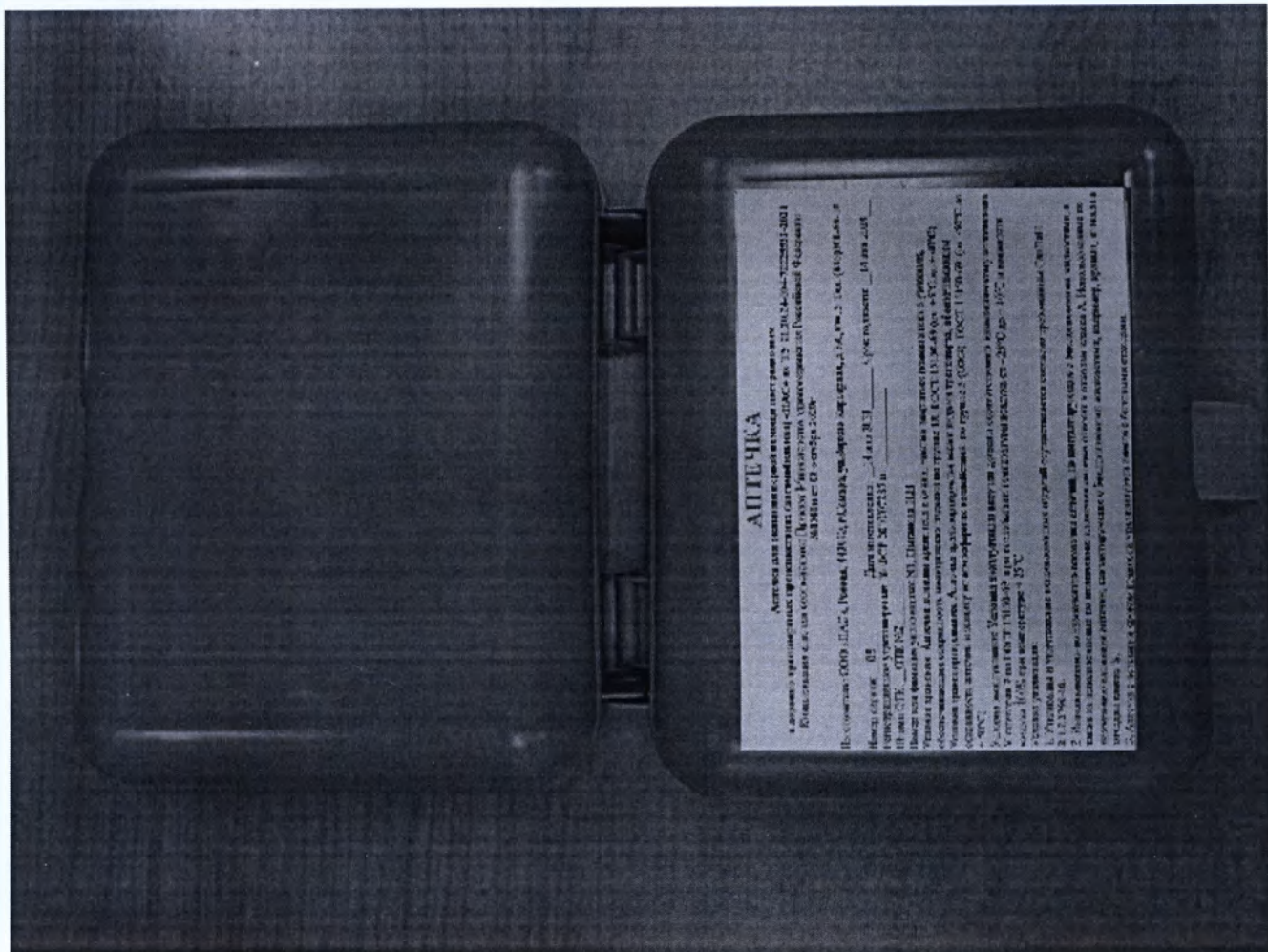


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021 - футляр

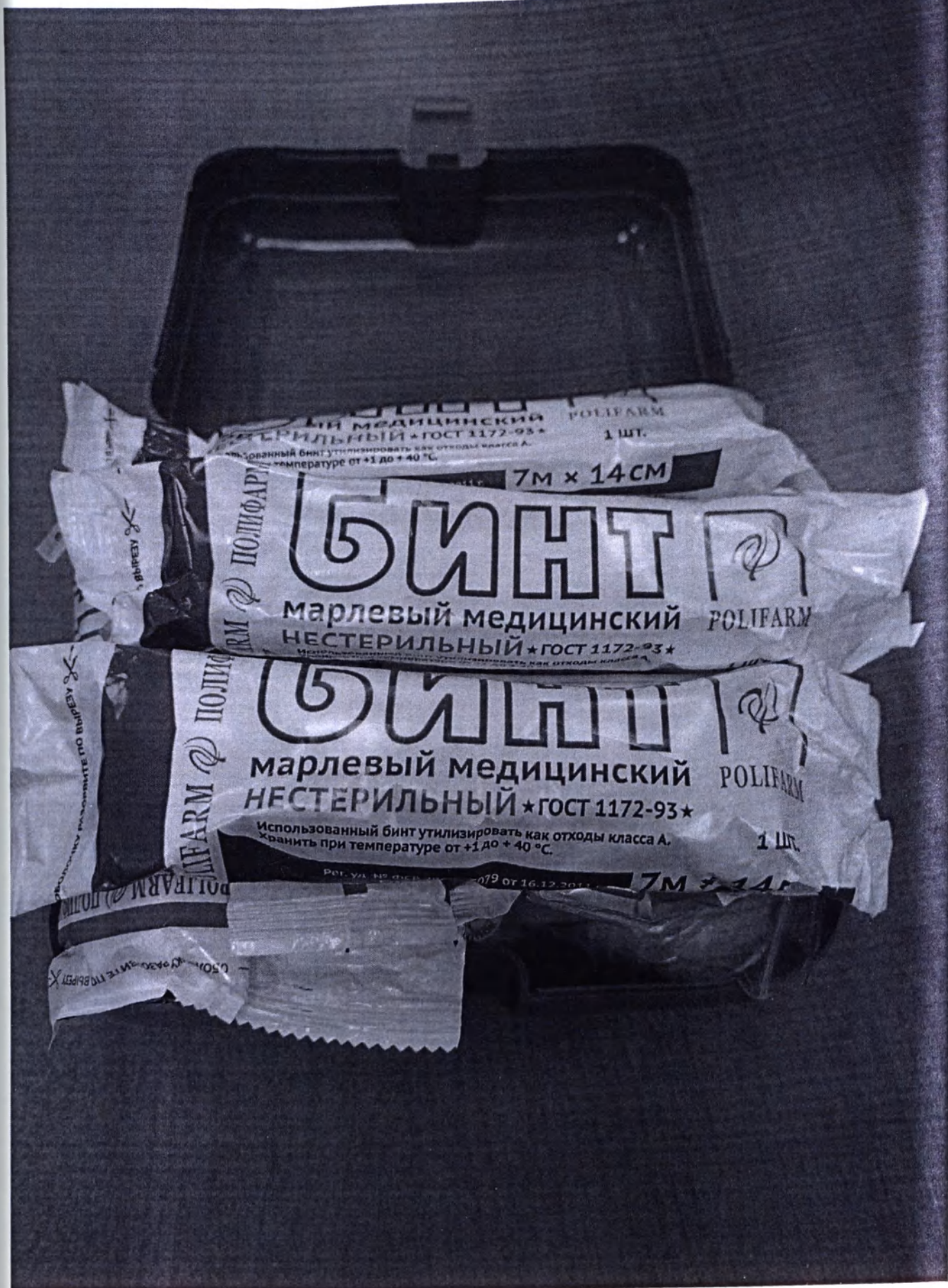


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021
- футляр с вложениями в открытом виде

Перечень вложений, входящих в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «ПАС»

№ п/п	Наименования вложения	Вид документа	Производитель	Количество
1. Медицинские изделия				
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	ПУ № РЭН 2010/07908	ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия	2 шт.
	Маски медицинские из нетканых материалов «СпецМедЗащита» по ТУ 9398-001-64015714-2010 в следующих исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные. ПУ № ФСР 2010/07908, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия. Вариант исполнения: Маска медицинская из нетканых материалов трехслойная на резинке			
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	ПУ № ФСЗ 2017/5747	TOP GLOVE SDN. BHD. (ТОП ГЛАН СДН. БХД.), Малайзия.	2 пары
	Перчатки медицинские (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» Вариант исполнения: Перчатки медицинские (смотровые) одноразовые нестерильные нитриловые текстурированные опудренные (манжета с валиком); цвет: белый, размер М, L.			
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»	ПУ № ФСР 2010/07434	ООО НПФ «МИРАЛ», Россия	1 шт.
	Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10			
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	ПУ № ФСР 2010/07432	ООО НПФ «МИРАЛ», Россия	1 шт.
	Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10			
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	ПУ № ФСР 2008/03223	ООО «ПКФ ВераМед», Россия	4 шт.
	Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 5 м x 10 см, или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 5 м x 10 см	ПУ № ФСР 2008/03079	ООО «Поллифарм», Россия	
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	ПУ № ФСР 2008/03223	ООО «ПКФ ВераМед», Россия	3 шт.
	Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. Вариант исполнения: Бинт			

	марлевый медицинский нестерильный размером 7 м x 14 см, или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 7 м x 14 см.	ПУ № ФСР 2008/03079	ООО «Поллифарм», Россия	
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16x14 см №10	ПУ № ФСР 2008/03225	ООО «ПКФ ВераМед», Россия	2 уп.
	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93			
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2x500 см	ПУ № ФСР 2007/01017	ООО «Лейко», Россия	1 шт.
	Лейкопластырь медицинский фиксирующий по ТУ 9393-004-5633-4457-2007. Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий размером 2x500 см или Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах. Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размером 2x500 см.	ПУ № ФСЗ 2008/01959	PharmLine Limited (ФармЛайн Лимитед), Великобритания.	
2. Прочие средства				
2.1	Ножницы	ПУ № РЭН 2016/4524	Agile Industries (Эджайл Индустриес), Пакистан	1 шт.
	Инструменты медицинские. Вариант исполнения: ножницы медицинские.			
2.2	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)			1 шт.
2.3	Футляр			1 шт.

Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.

По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4-1.6 и 1.8 настоящих требований.

Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24-004-72225532 - 2021 - инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) (Приложение Б)

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)




N п/п	Наименование вложения	Использование
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
2.1	Ножницы	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок.

Общая последовательность действий на месте происшествия (универсальный алгоритм оказания первой помощи)

Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, выполните следующие действия:

1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи.
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания – перейдите к п.7 Алгоритма.
3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания переходите к п.6 Алгоритма.
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специальные службы. (по тел.112, 103, 03, или региональным номерам), привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне.
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания «Роткорту», «Роткносу», с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к п.6 Алгоритма.
6. При появлении (или наличии) признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей.
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут; или выполните максимальное сгибание конечности в суставе.
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощь в случае выявления указанных состояний.
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий).
10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку.

Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив им необходимую информацию.

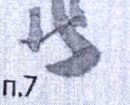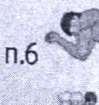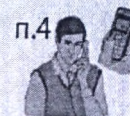

Упаковочный лист

Изготовитель: ООО «ПАС», Россия, 443070, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д. 3А.
Тел. (846)201-69-10

Футляр пластиковый 170,0 (± 5,0) × 145,0 (± 5,0) × 70,0 (± 5,0) мм.

Наименование изделий	Единица измерения	Количество	Масса, г	Примечание
Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» ТУ 21.20.24-004-72225532-2021	Пт.	1	300	нет

Номер или фамилия упаковщика: N1, Цыганова Н.Н

Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021
- упаковочный лист

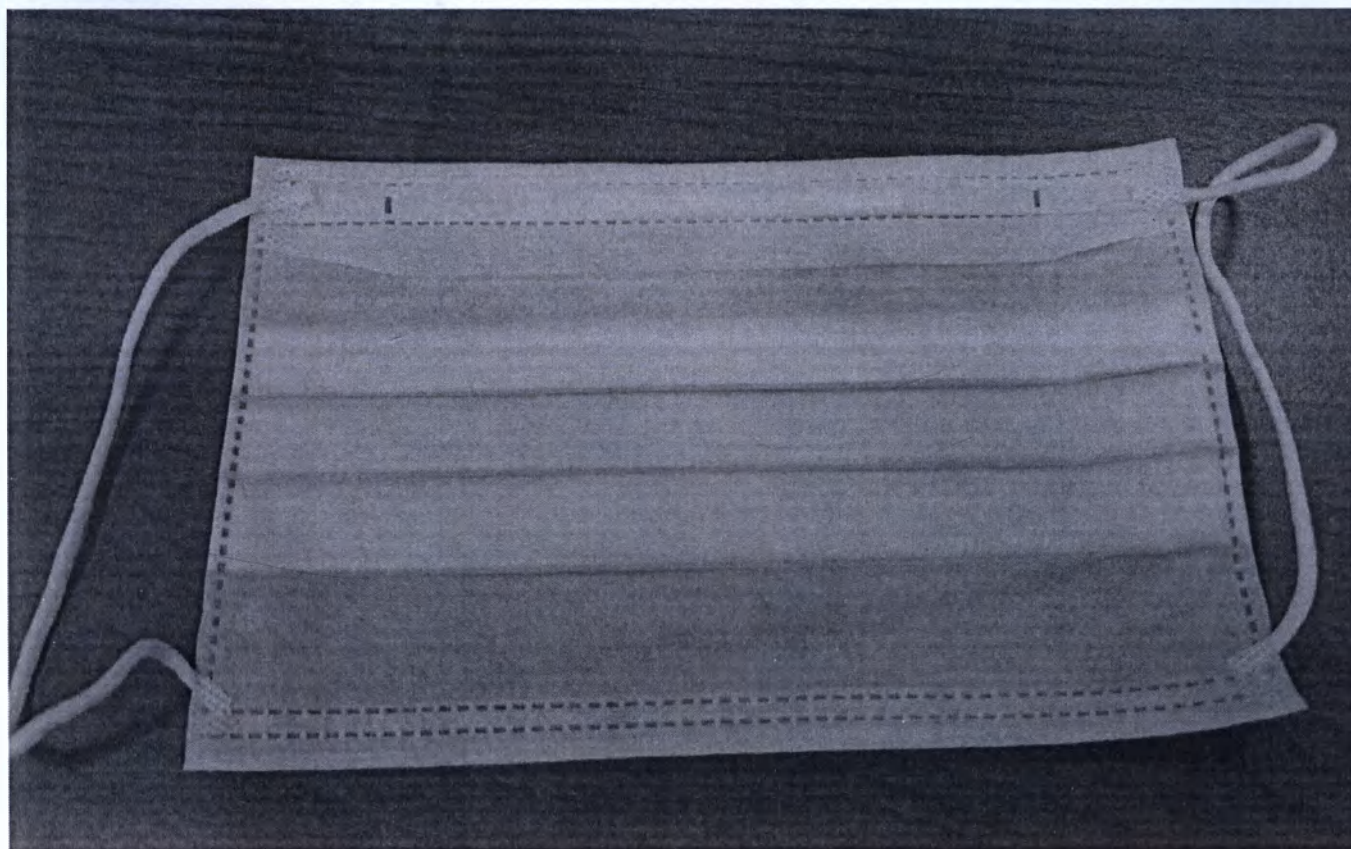
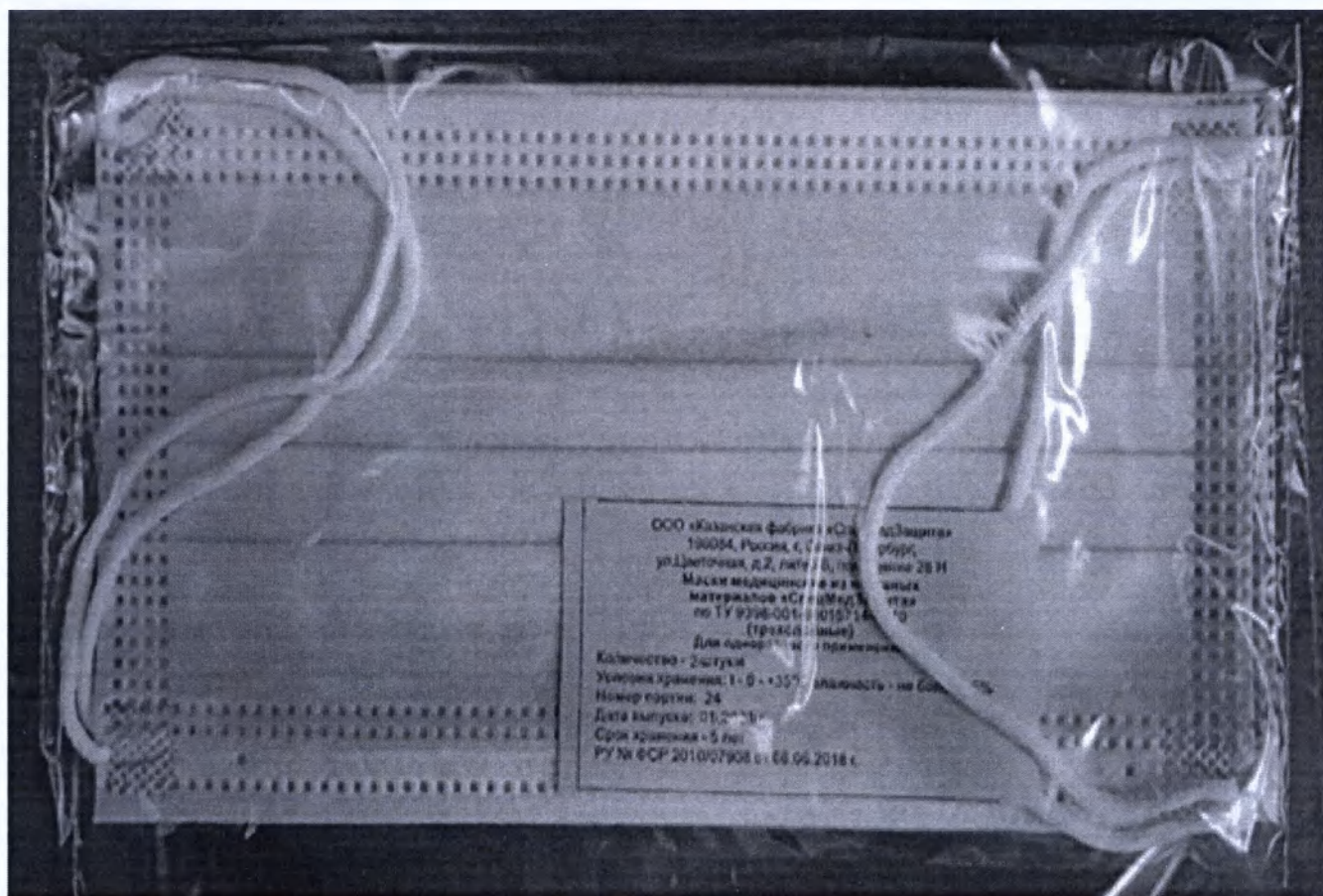


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021

1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая - 2 шт.

- Маски медицинские из нетканых материалов «СпецМедЗащита» по ТУ 9398-001-64015714-2010 в следующих исполнениях однослойные, двухслойные, трехслойные. РУ № ФСР 2010/07908, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия.

Вариант исполнения: Маска медицинская из нетканых материалов трехслойная на резинке

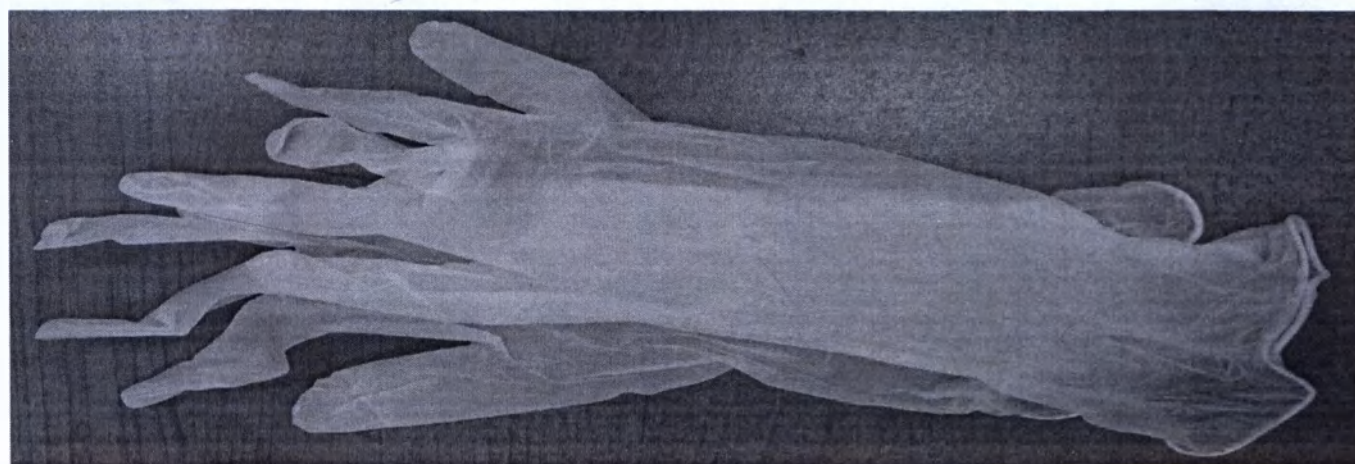
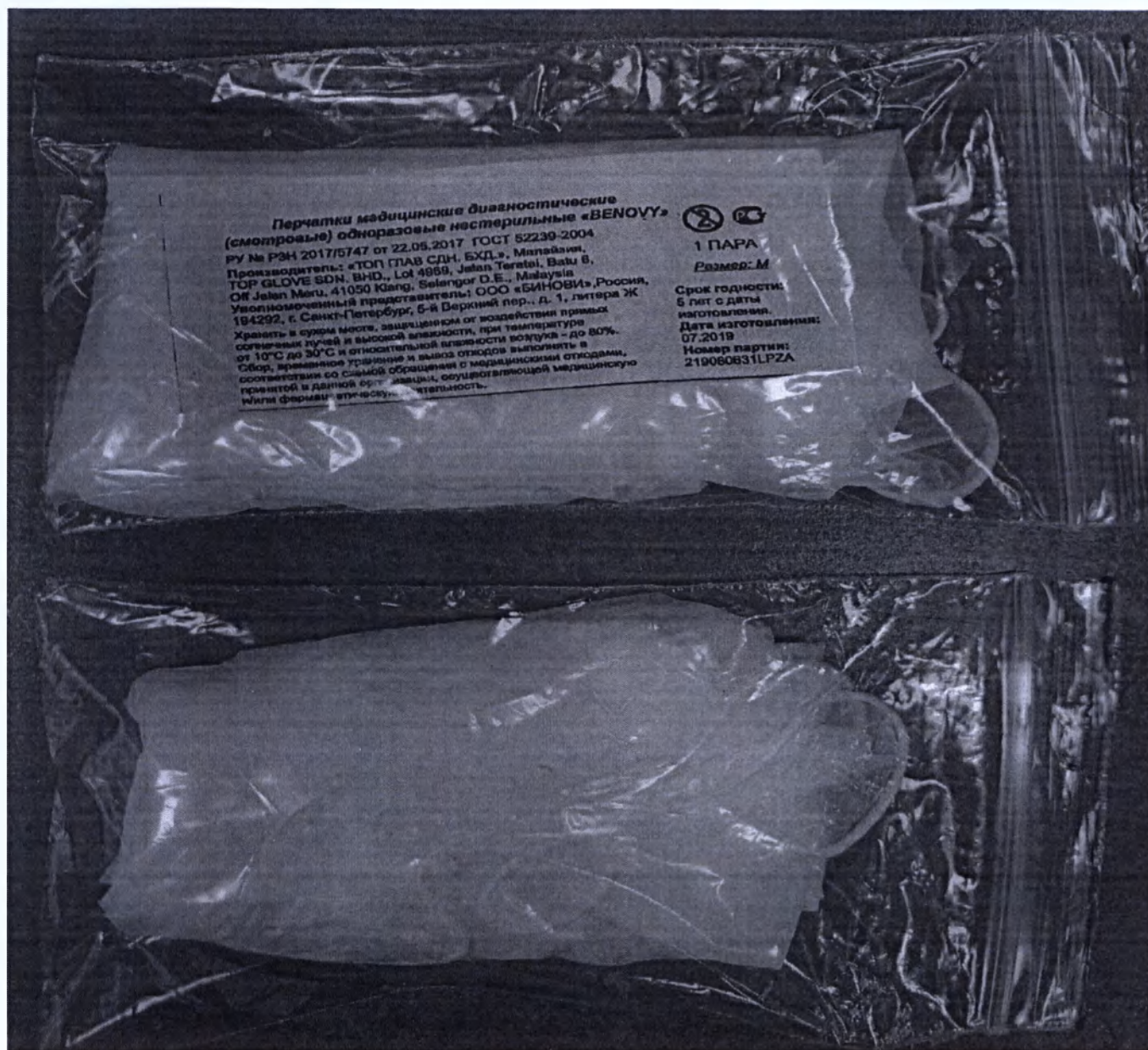


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021

1.2. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М - 2 пары.

- Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY», РУ № РЗН 2017/5747, производства TOP GLOVE SDN. BHD. (ТОП ГЛАВ СДН. БХД.), Малайзия.

Вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные опудренные (манжета с валиком); цвет: белый, на примере размера М.

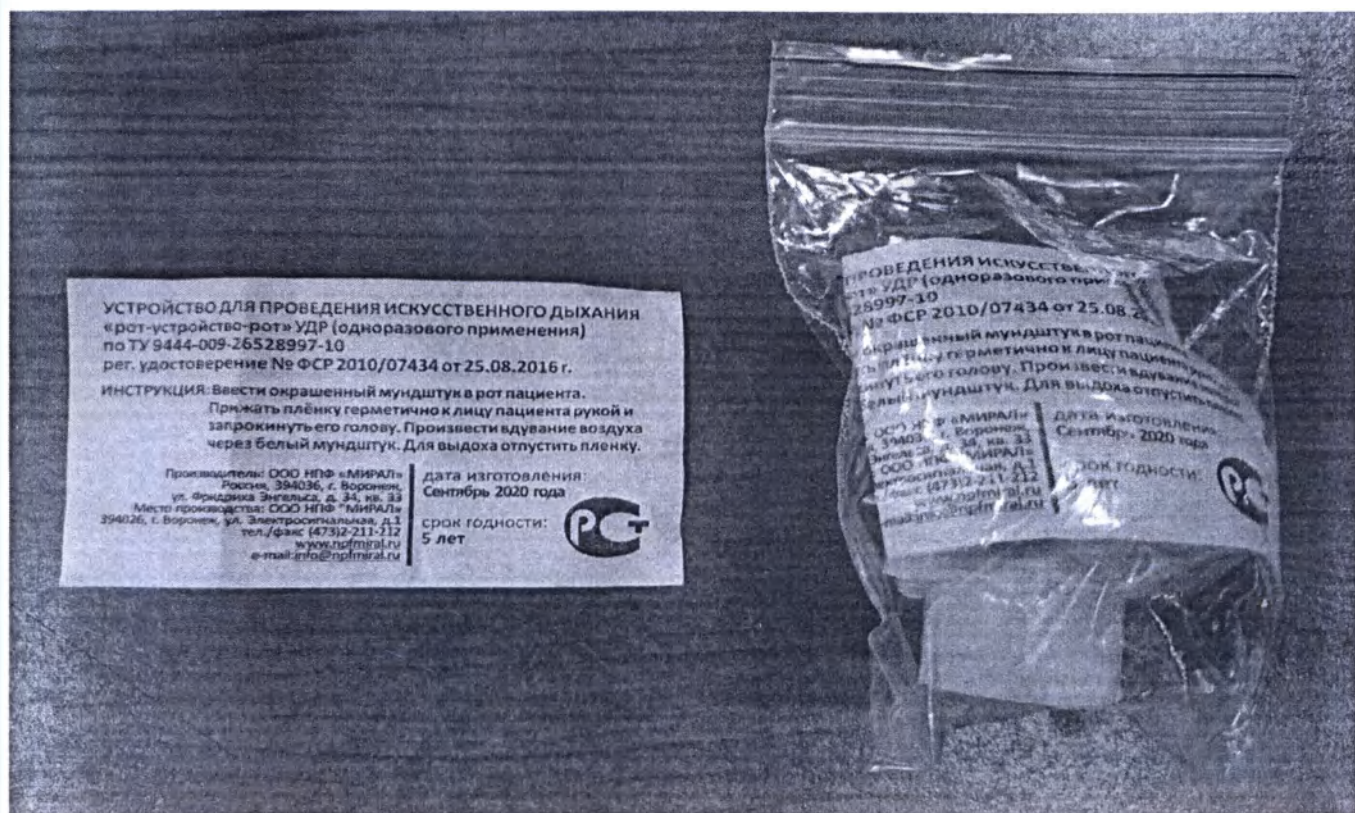


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021

1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» - 1 шт.

- Устройство для проведения искусственного дыхания –«рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10. РУ № ФСР 2010/07434, производства ООО НПФ «МИРАЛ», Россия

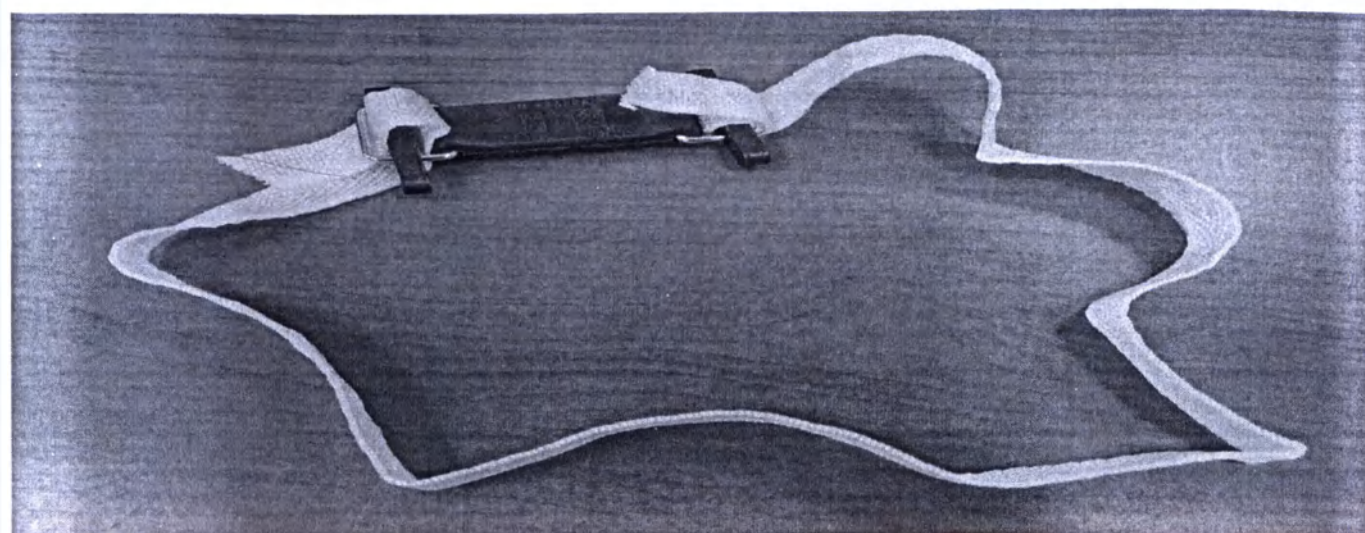
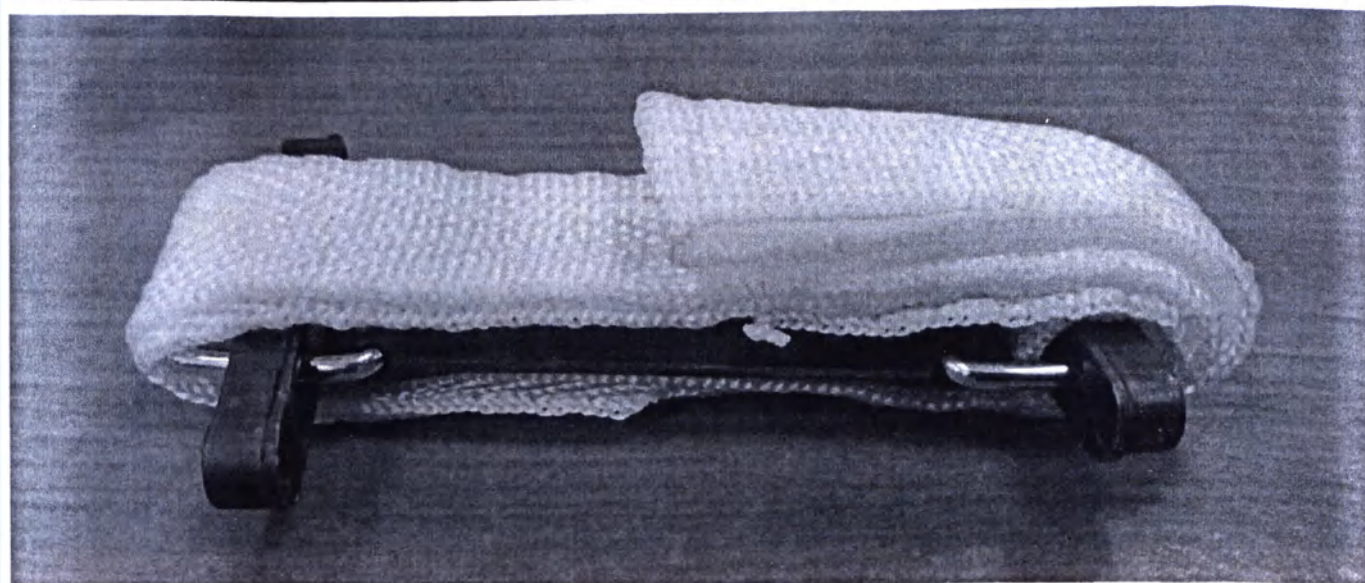
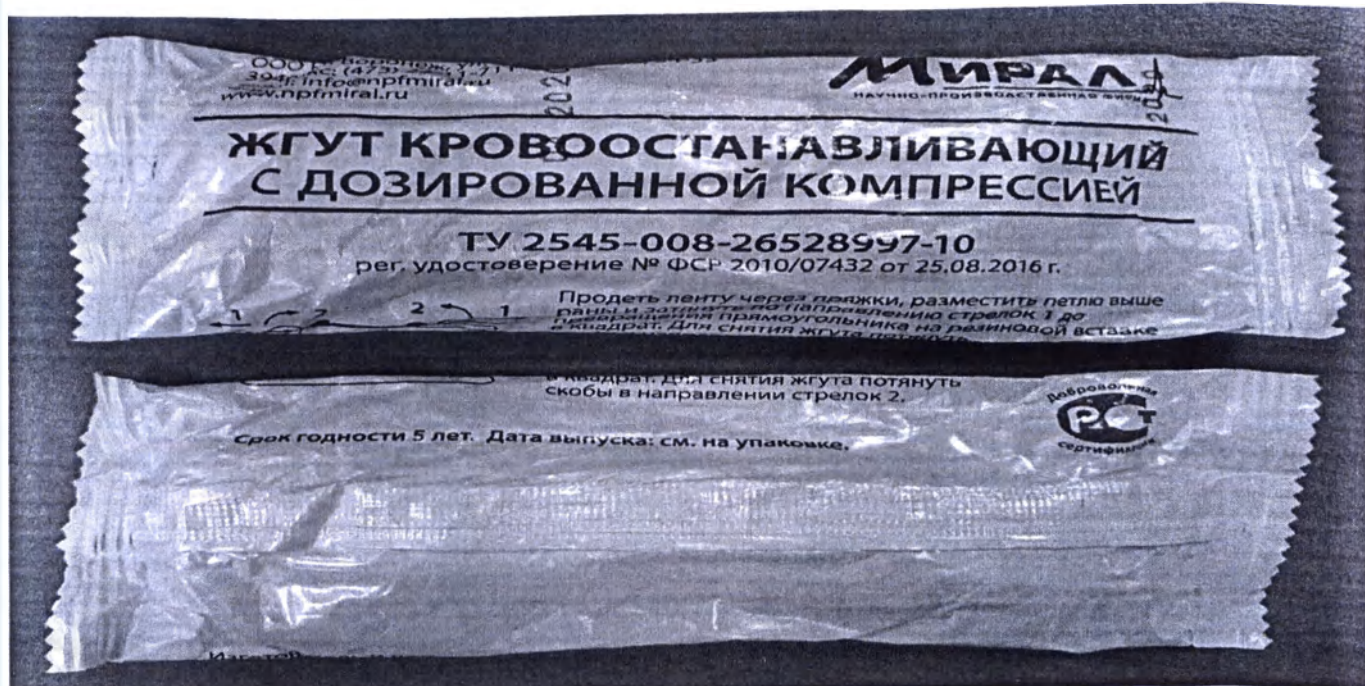


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021

1.4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт.

- Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10, РУ № ФСР 2010/07432, производства ООО НПФ «МИРАЛ», Россия

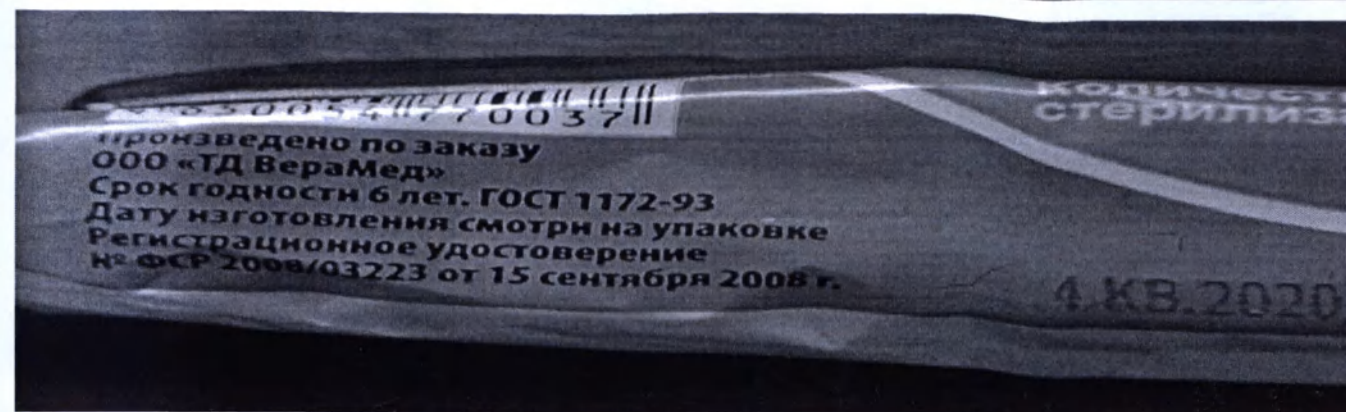
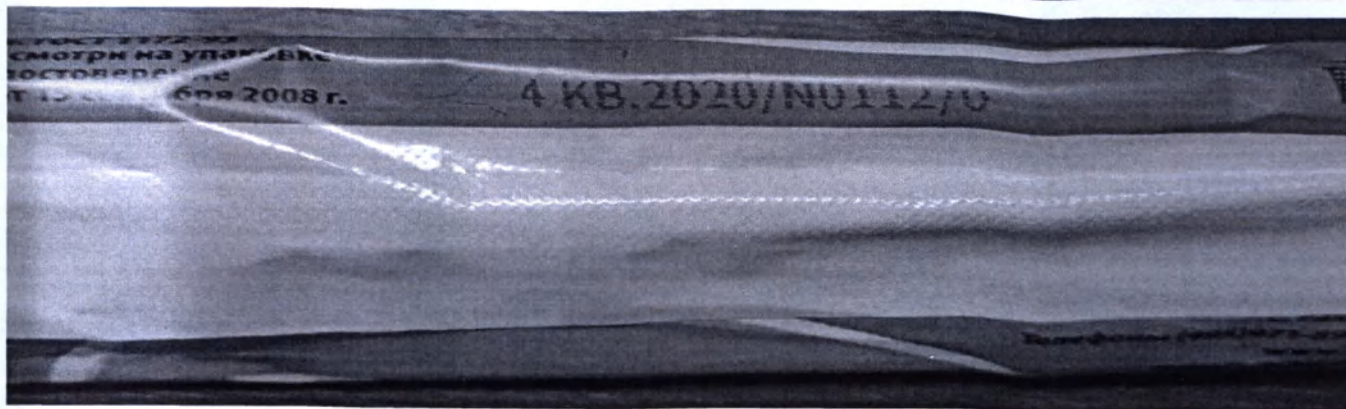


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021

1.5 Бинт марлевый медицинский размером не менее 5м x 10 см - 4 шт.

- Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03223, производства ООО "ПКФ ВераМед", Россия

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 5 м x 10 см.

или

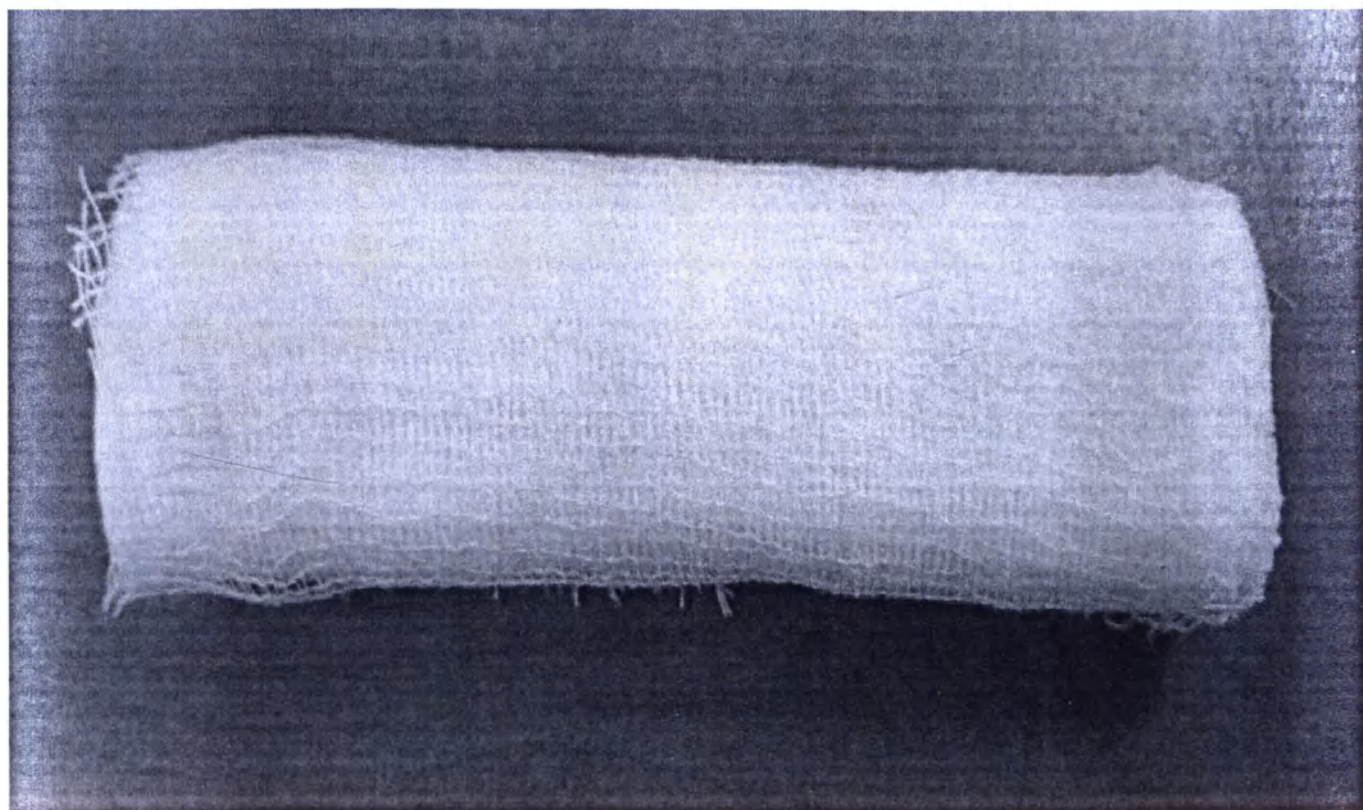


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021
 - Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03079, производства ООО "Полифарм", Россия
 Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный размером 5 м x 10 см.

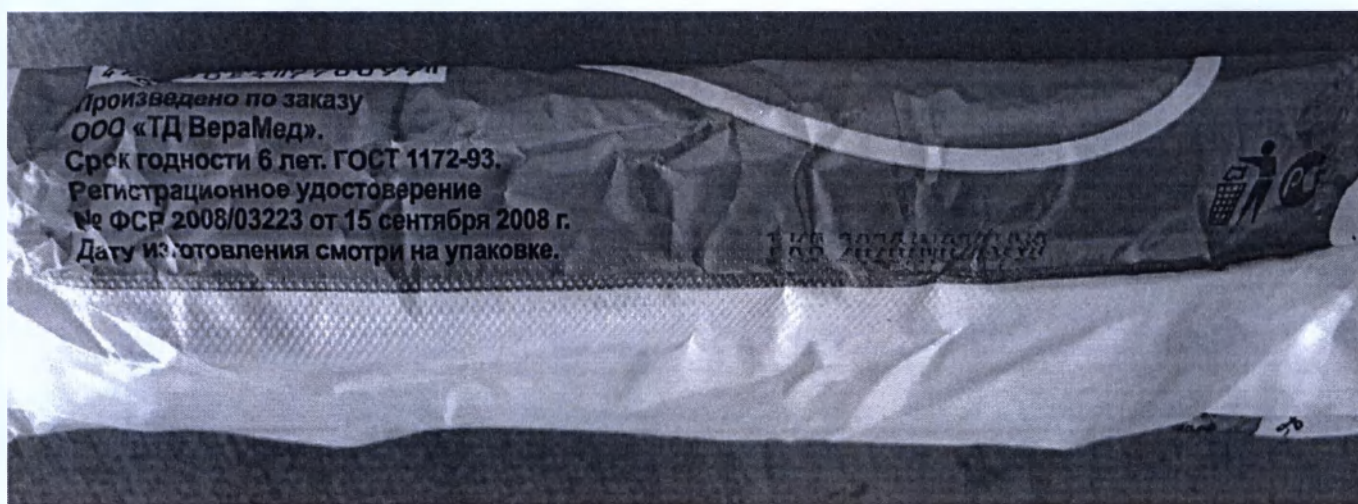


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021

1.6 Бинт марлевый медицинский размером не менее 7м x 14 см - 3 шт.

- Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03223, производства ООО "ПКФ ВераМед", Россия

Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером 7 м x 14 см.

или

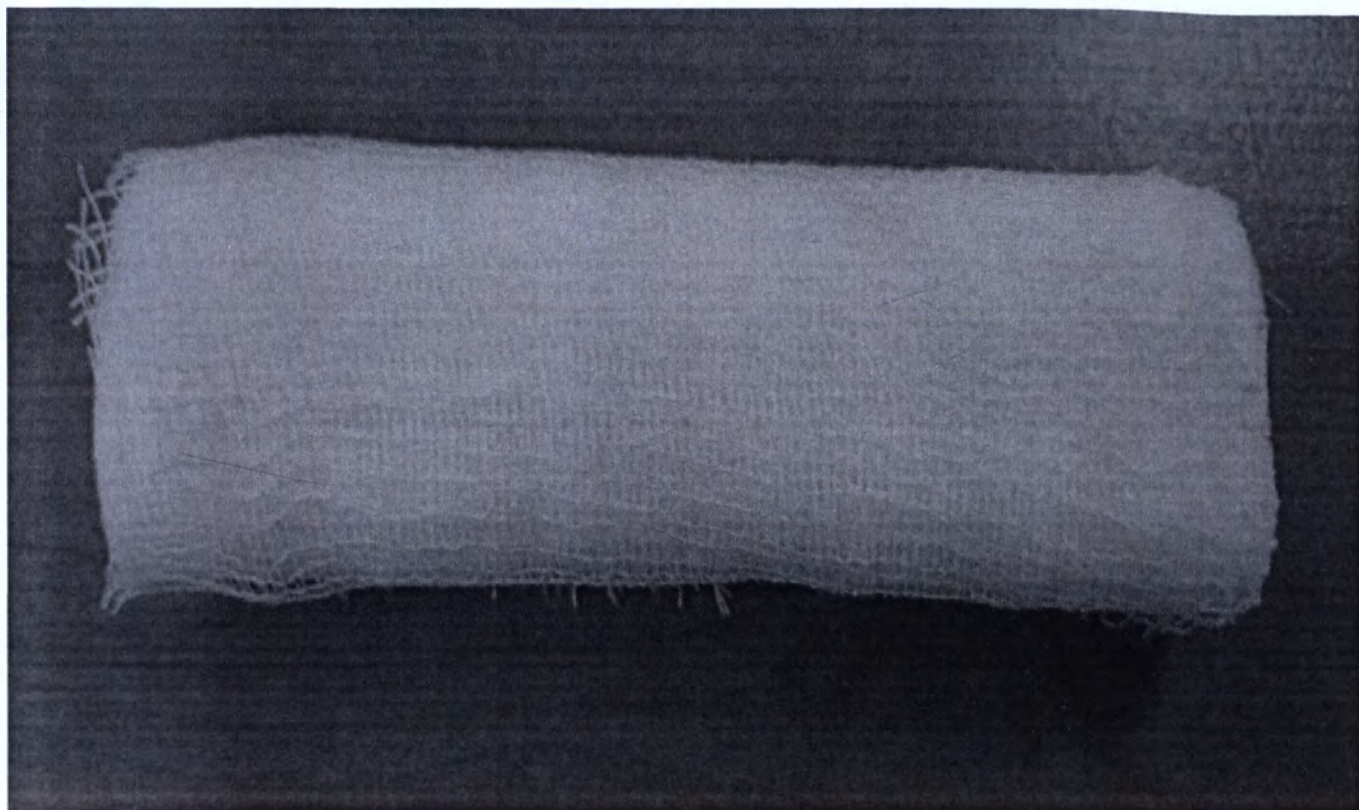


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021
 - Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93. РУ № ФСР 2008/03079, производства ООО "Полифарм", Россия
 Вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский не стерильный размером 7 м x 14 см.

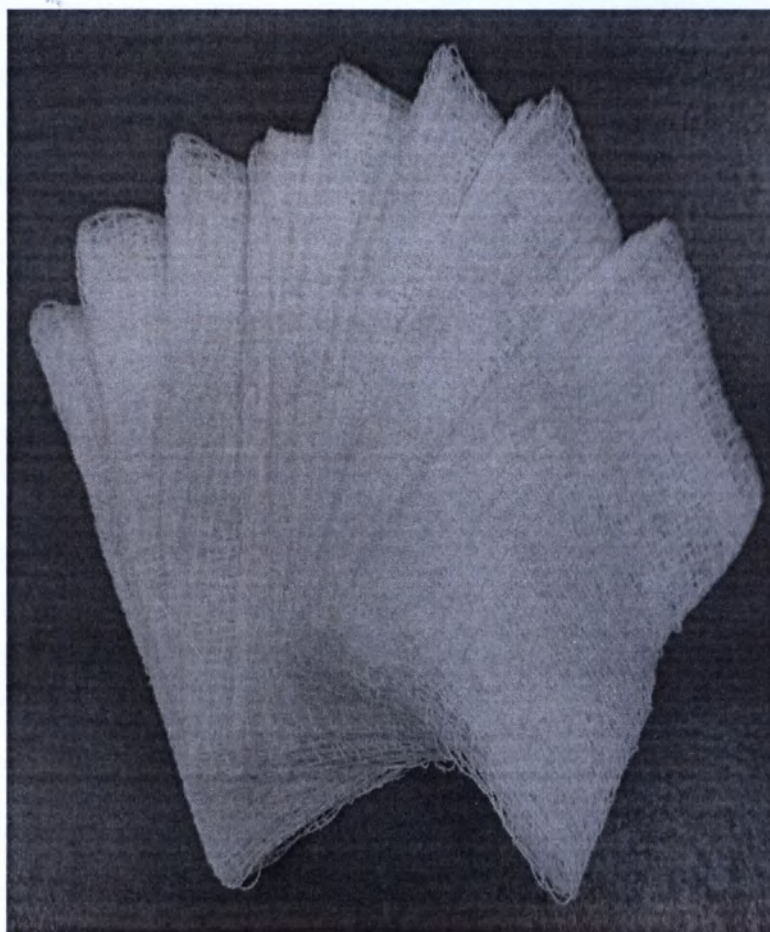
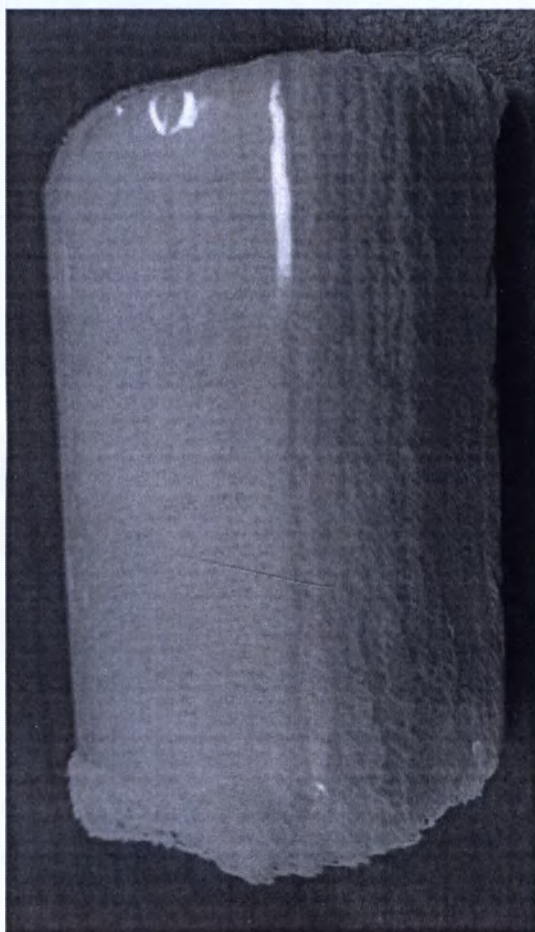
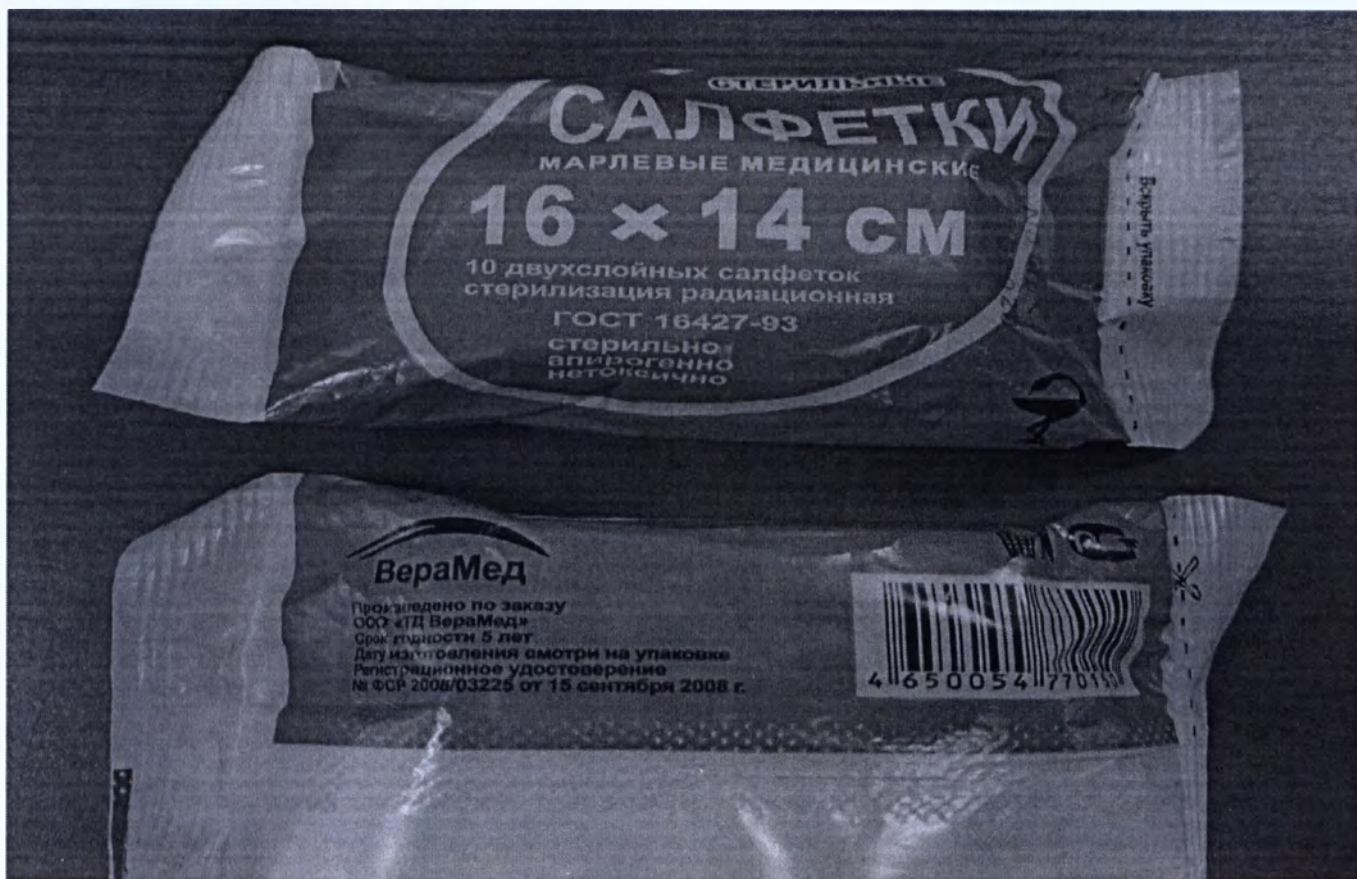


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021

1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16x14 см №10 - 2 уп.

- Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93. РУ № ФСР 2008/03225, производства ООО "ПКФ ВераМед", Россия

Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16x14 см.

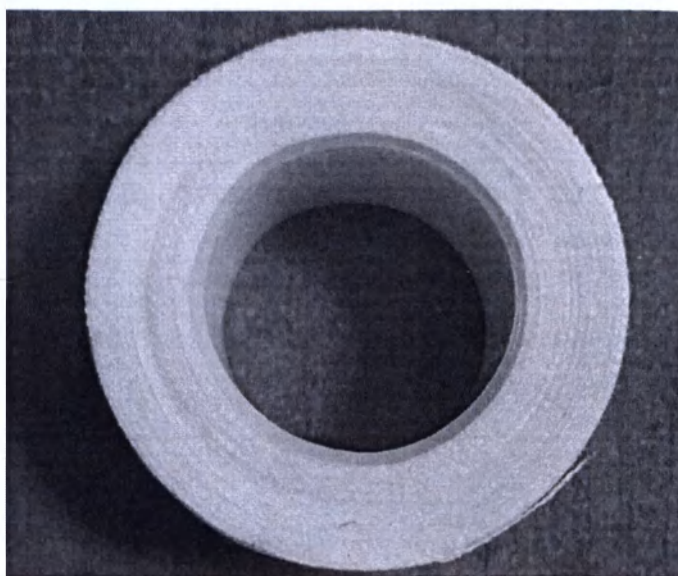


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 7225532 - 2021

1.8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2х500 см - 1 шт.

- Лейкопластырь медицинский фиксирующий по ТУ 9393-004-56334457-2007. РУ № ФСР 2007/01017, производства ООО "Лейко", Россия

Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий размером 2х500 см или

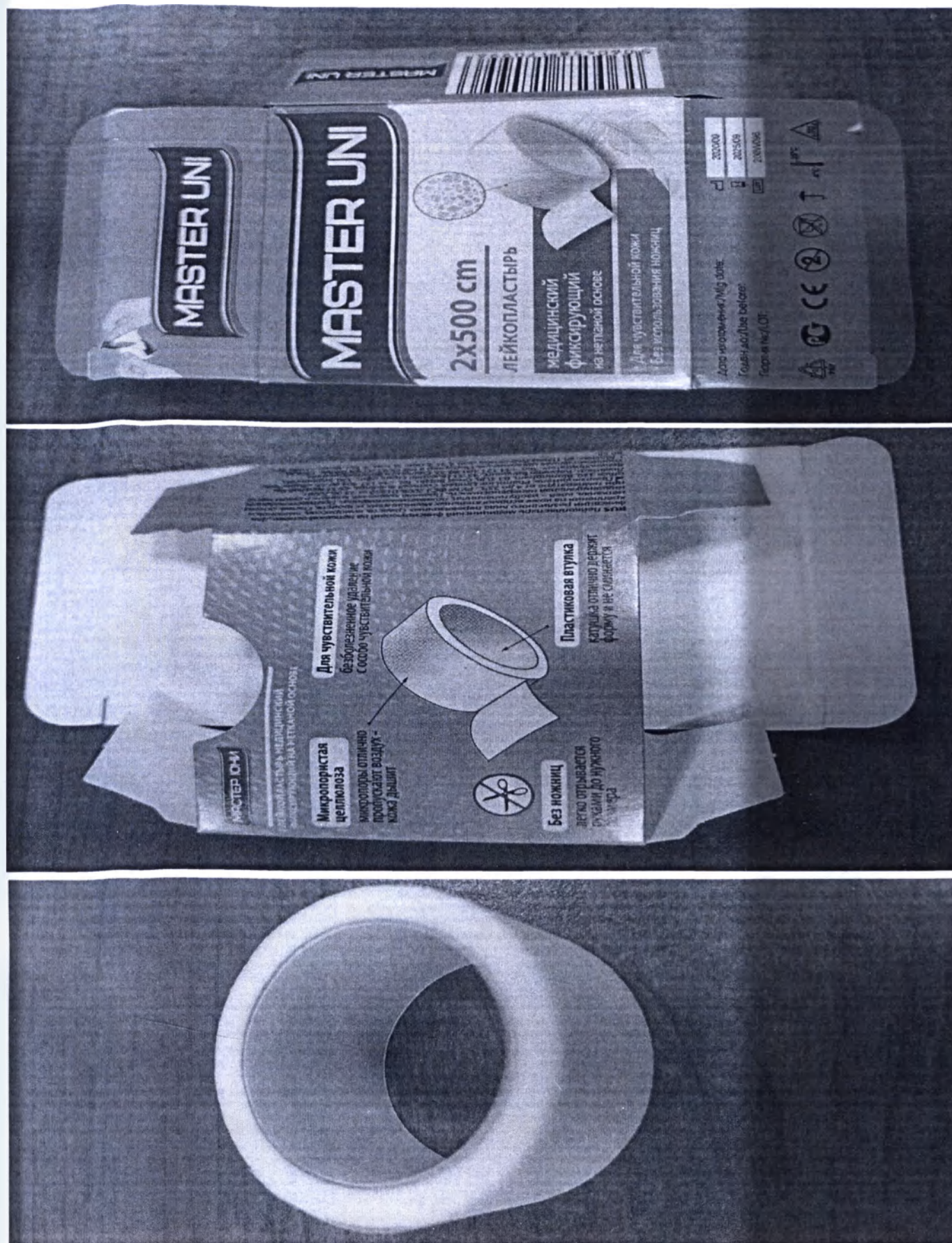


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021

- Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах. РУ № ФСЗ 2008/01959, производства PharmLine Limited (ФармЛайн Лимитед), Великобритания.

Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размером 2x500 см

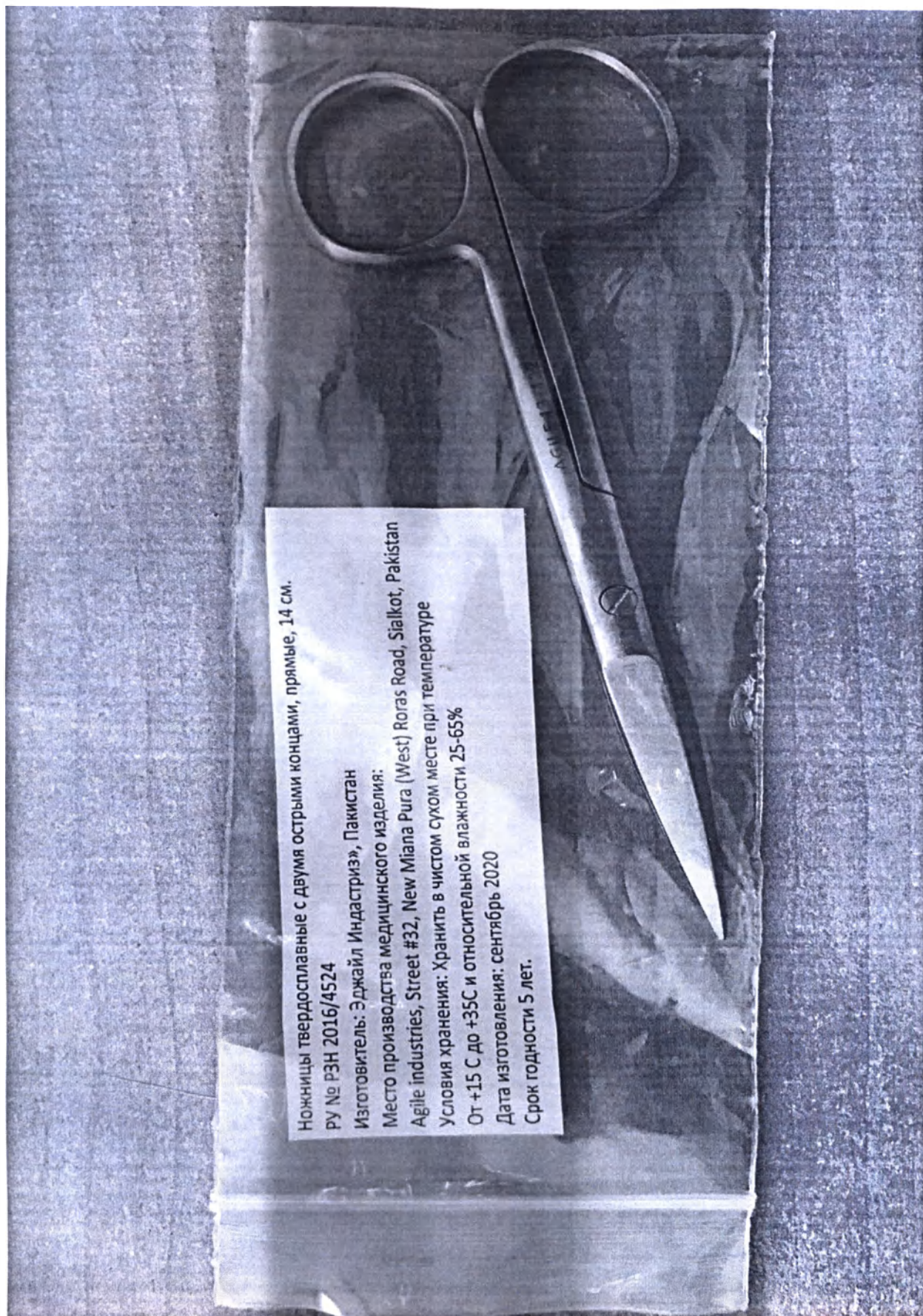


Фото. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ПАС» по ТУ 21.20.24- 004- 72225532 - 2021

2.1. Ножницы – 1 шт.

- Инструменты медицинские. РУ № РЗН 2016/4524, производства Agile Industries (Эджайл Индастриз), Пакистан.

Вариант исполнения: Ножницы медицинские.

Сшито и заверено печатью 20
(Людмила) лист 6



ООО «ПАС»
Директор
Попов А.С.