

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Искра Сангио»

/Дубовик С.А./

04.05.2012г.



Инструкция по применению

Изделие для магнитной терапии на основе постоянного магнита «PIP ELEKIBAN», варианты исполнения: «PIP ELEKIBAN», «PIP ELEKIBAN A»

2012

Название:

Изделие для магнитной терапии на основе постоянного магнита «PIP ELEKIBAN», варианты исполнения: «PIP ELEKIBAN», «PIP ELEKIBAN A»

Область применения:



Изделие для магнитной терапии, на основе постоянного магнита, для использования в индивидуальных условиях. Общее применение в домашних условиях.

Функции и эффект:

Местное улучшение кровообращения и устранение болей за счет воздействия магнитного излучения, источником которого является постоянный магнит.

Форма:

Изделие представляет собой магнитную пластинку круглой формы, диаметром 5,2 мм, закрепленную на пластыре на тканевой основе, покрытом защитным бумажным слоем.

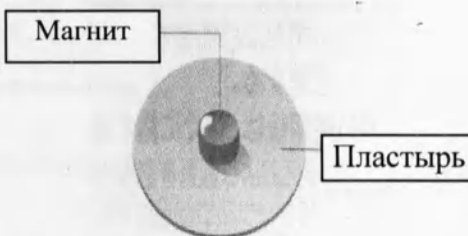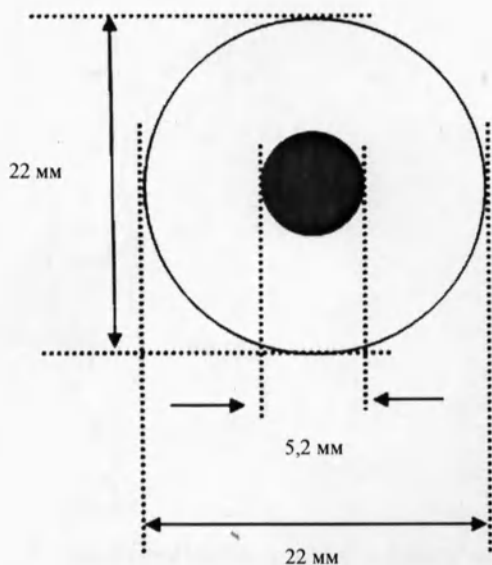


Перед использованием изделия внимательно изучите данную инструкцию. Она поможет вам правильно разместить изделие на теле и вскоре избавиться от боли!

Изделие наклеивается на соответствующий участок тела и способствует устранению боли на данном участке.


Использование изделия в течение 2 суток усиливает лечебный эффект.

Отделение

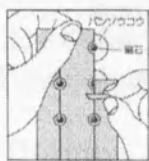

Определение положения болевой точки

Для определения положения болевой точки слегка нажмите пальцем на тот участок вашего тела, на котором ощущается боль. Заметное усиление болезненных ощущений в определенной точке свидетельствует о том, что они и является болевой точкой.

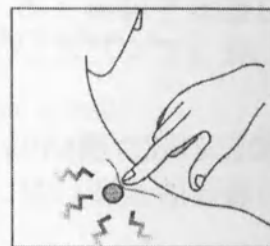

Наклеивание


На иллюстрации точки наклеивания обозначены кружками.

При необходимости для усиления эффекта наклеивайте средство с обеих сторон, либо вокруг болевой точки.

(В зависимости от интенсивности болезненных ощущений можно держать средство наклеенным от 2 до 5 суток).



Точки онемения на теле человека

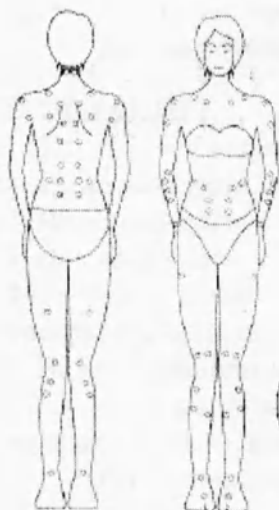

- * Цвет пластыря близок к цвету кожи, и поэтому трудноразличим на теле
- * Наклеивайте на спину и поясницу в соответствии с инструкцией

При использовании изделия обращайтесь особое внимание на следующие пункты:

- * Перед использованием изделия внимательно изучите инструкцию.
- * В период использования изделия рекомендуем иметь инструкцию под рукой для справок.

PIP ELEKIBAN

Максимальное значение плотности магнитного потока составляет 80 мТл.

PIP ELEKIBAN A

Максимальное значение плотности магнитного потока составляет 130 мТл.

Лечебный эффект - местное улучшение кровообращения и устранение болей.
Номер лицензии на средство медицинского назначения 22100BZX00297000.

Правила использования:

- (1) Отделить изделие от бумажной подложки.
- (2) Наклеить изделие на пораженный участок тела.

Меры предосторожности.

Указывает на то, что нарушение правил использования изделия может стать

причиной получения травм и физических повреждений, в том числе со смертельным исходом.

* К физическим повреждениям относятся серьезные повреждения предметов домашнего обихода, а также травмирование домашних животных.

1. Запрещено использовать изделие лицам, которым имплантированы какие-либо электронные устройства медицинского назначения (сердечный стимулятор, шунты для отвода спинномозговой жидкости и т.д.). Магнитное поле может оказать существенное отрицательное воздействие на функционирование таких устройств.

2. Не допускайте попадания магнита в органы пищеварения.

(1) Для предотвращения повреждений и травм в результате нарушения правил использования изделия его следует хранить в местах, недоступных для детей и для лиц, не способных контролировать свои действия.

(2) Во избежание случайного проглатывания магнита ребенком или лицом, не способным контролировать свои действия, убирайте изделие в место хранения незамедлительно по окончании использования.

- В случае проглатывания магнита немедленно обратитесь к врачу. Возможно, пострадавшему потребуется хирургическая операция.

ВНИМАНИЕ!

1. Не следует использовать изделие при наличии раздражений и повреждений кожного покрова в области шеи. Использование изделия может привести к усилению раздражений.

2. Не используйте в области вокруг глаз.

3. Не следует использовать изделие одновременно с другими лечебными средствами.

4. В случае появления раздражения на коже или ухудшения самочувствия немедленно прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.

5. Во время использования изделия:

(1) При возникновении зуда или болезненных ощущений немедленно удалите изделие (Можно приклеить новое изделие рядом).

(2) Не приклеивайте изделие постоянно на одно и то же место

* Если в прошлом у вас появлялись раздражения, используйте изделие с осторожностью.

● При появлении раздражений немедленно обратитесь к врачу.

6. Не оставляйте изделие в непосредственной близости от предметов, которые могут пострадать от воздействия магнитного излучения (часы, магнитные карты, накопители информации и т. д.). Это может стать причиной потери данных.

Внимание! Важная информация!

1. Если вы проходите курс лечения, в обязательном порядке проконсультируйтесь со специалистом относительно возможности использования изделия. В обязательной консультации специалиста также нуждаются:

(1) лица, страдающие онкологическими заболеваниями;

(2) лица, страдающие сердечными заболеваниями;

(3) женщины на ранних сроках беременности и в раннем послеродовом периоде;

(4) лица с пониженной чувствительностью в результате поражений нервной системы, вызванной диабетом;

(5) лица, имеющие раздражения или другие повреждения кожи;

(6) лица, нуждающиеся в покое;

(7) больные в лихорадочном состоянии при температуре тела выше 38°

Пример 1: Период обострения воспалений (сильная усталость, озноб, изменения кровяного давления),

Пример 2: Истощение

(8) Лица, страдающие колющими болями в результате вывиха или растяжения


2. Не используйте изделие одновременно с другими медицинскими приспособлениями.
3. При отсутствии улучшений после использования изделия проконсультируйтесь со специалистом.

Рекомендации.

Для обеспечения надежного контакта изделия с кожей:

1. Перед наклеиванием тщательно протрите кожу.
2. Во время наклеивания не допускайте образования складок.
3. Наклеивая изделие после занятий спортом или посещения сауны, тщательно удаляйте с кожи пот и влагу.
4. Наклеивая изделие перед принятием ванны, нажимайте на изделие с некоторым усилием.
5. Промывая область наклеивания пластыря, не прилагайте чрезмерных усилий.

Указания по хранению изделия

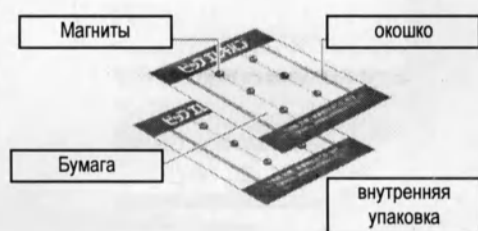

Помещая изделие на хранение, проследите за тем, чтобы магниты были развернуты в одну сторону (при взгляде со стороны прозрачного окошка упаковки). Несоблюдение схемы сложения может привести к распространению магнитного поля за пределы упаковки.

Рекомендация.

Обеспечьте защиту изделия от прямых солнечных лучей.

(Контактные данные производителя и продавца средства)

Производитель и продавец: "PIP CO.,LTD."

Адрес: Префектура Нара, г.Тэнри, Минами рокудзё-тё, 182 (завод в Нара)

Вопросы и замечания покупателей принимаются:

Телефон в г. Осака: (06)6945 – 4427 (10:00 – 17:00)

Телефон в г. Токио: (03)3252-6546 (10:00 – 17:00)

Производитель: "PIP CO.,LTD."

Адрес: г. Осака, Тюо-ку, Нонинбаси 2-тёмэ, 1-36

* Настоящий документ подготовлен в соответствии с поправкой к закону «О здравоохранении» от 1 апреля 2005 года

* В обязательном порядке ознакомьтесь с инструкцией.

Всего прощено
и скреплено
пятью бланков

