


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РИММ ЛАБОРАТОРИЯ»

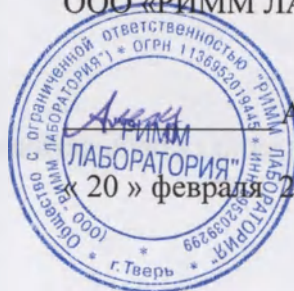

А. В. Алексеев

20 » февраля 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОКТОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ «Проктостатикс»

Назначение

Салфетки бумажные для ухода за проктологическими больными «Проктостатикс» предназначены для обработки анальной области после дефекации при различных видах неосложненного геморроя. Изделие, применяется для облегчения состояния и в целях профилактики геморроя.

Условия применения

Салфетки применяются для личной гигиены и предназначены для использования в амбулаторных условиях.

Область применения

Колопроктология.

Основные технические характеристики

Салфетки изготавливаются из 100% целлюлозы.

Салфетки изготавливают двуслойными, с перфорацией, теснением, белого цвета, с пропиткой лекарственными средствами (анестезин, новокаин, ментол).

Размер салфетки: ширина ($9,5 \pm 0,3$) см х длина ($12,3 \pm 0,5$) см.

Общая длина рулона общая длина рулона - $19,5 \pm 0,5$ м.

Один рулон содержит - 160 ± 1 салфеток.

Масса салфеток площадью 1 м^2 , г - $36,8 \pm 2$

Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям Н(кгс) не менее в сухом состоянии - 1,5-2,5

Впитываемость капиллярная в продольном направлении за 10 мин, мм, не менее - 85

pH водной вытяжки - от 6,0 до 7,0

Влажность, %, не более - 8,0

Содержание анестезина (бензокаина) в 100 гр. изделия, не менее - $0,9 \pm 0,1$ г

Содержание новокаина (прокаина) в 100 гр. изделия, не менее - $0,9 \pm 0,1$ г

Содержание ментола (левоментола) в 100 гр. изделия, не менее - $1,6 \pm 0,1$ г

Противопоказания к применению

- повышенная чувствительность к компонентам салфетки;
- ущемление геморроидального узла, выраженное выпадение геморроидальных узлов или выпадение слизистой оболочки прямой кишки;
- геморроидальное кровотечение;
- детский возраст до 14 лет;
- С осторожностью беременность, период лактации.