

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Реакционные модули (Reaction Module)
для автоматических анализаторов MAGLUMI®***

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор





Смирнов Э.А.

2021 г.

***Реакционные модули (Reaction Module)
для автоматических анализаторов MAGLUMI[®],
в составе:***

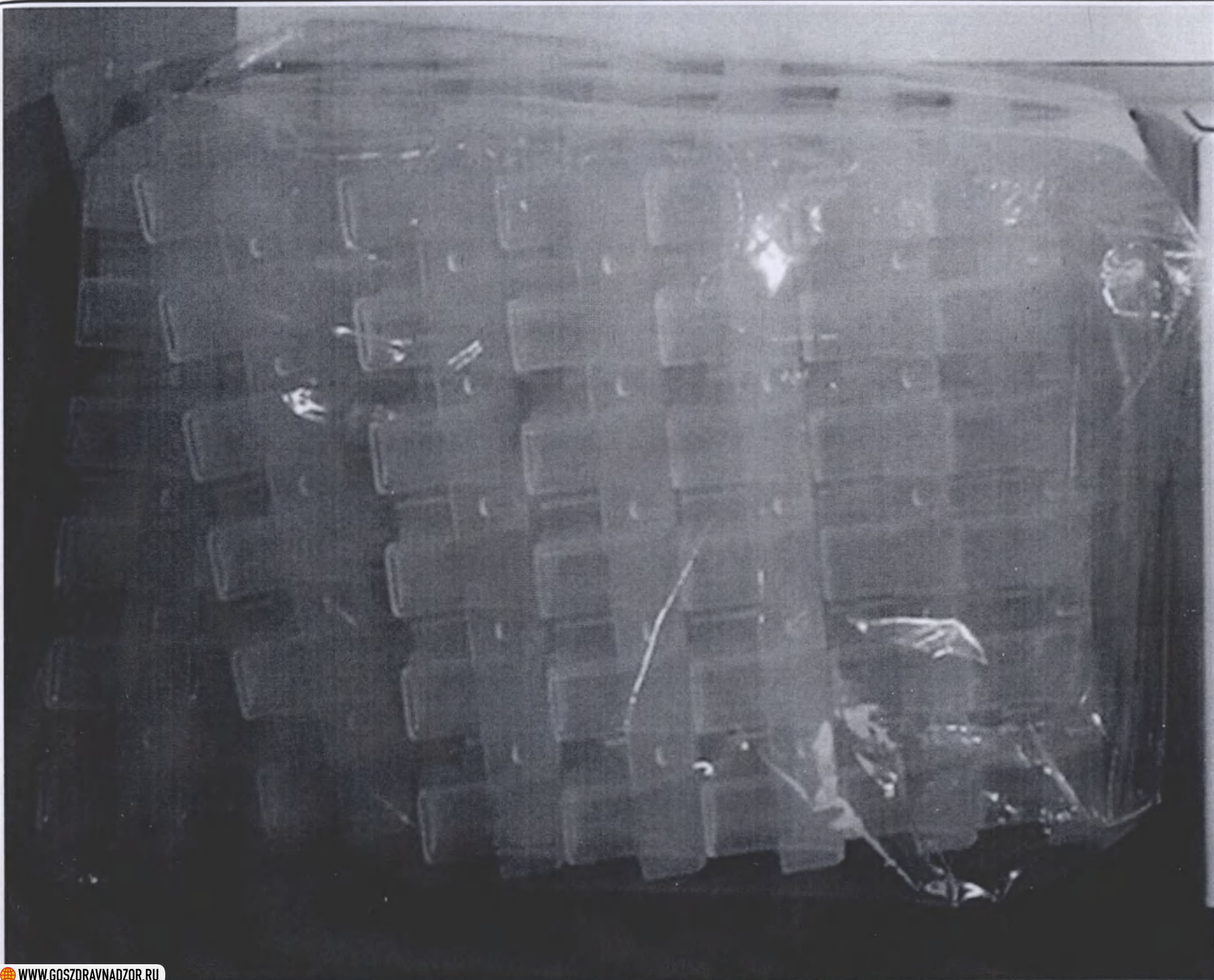

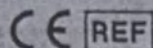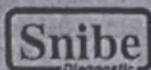

630003

Инструкция по применению

Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов MAGLUMI®.

1. ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга *in vitro* на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначено для размещения реакционных смесей в иммунохемилюминесцентных анализаторах MAGLUMI®.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Реакционные модули (Reaction Module) для
автоматических анализаторов MAGLUMI®

6 коробок по 64
реакционных модуля.

Инструкция по применению

1 шт.

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Реакционные модули (Reaction Module) для
автоматических анализаторов MAGLUMI®

Изделие содержит 6 коробок по 64
реакционных модуля в каждой.
Каждый модуль имеет 6 отделений.
1 шт.

Инструкция по применению

4. НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Наименование	REF
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный MAGLUMI® с принадлежностями	23020003 23020007
Набор реагентов <i>in vitro</i> для автоматических анализаторов MAGLUMI®	индивидуально
Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130299004M
Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130299006M
Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130299005M
Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130299007M
Мешок для отходов (Waste Bag) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в вариантах исполнения	21060726 21060624

5. ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

До распечатывания хранить при комнатной температуре в оригинальной коробке.

Инструкция Reaction Module-en-EU-V6.0-2019

Всего прошнуровано и
скреплено 4 лист «об»

