

**Фотографические изображения
медицинского изделия**


***Раствор для очистки системы пробирок
(System Tubing Cleaning Solution) для автоматических
анализаторов MAGLUMI®***

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор



***Раствор для очистки системы пробирок
(System Tubing Cleaning Solution)
для автоматических анализаторов MAGLUMI[®],
в составе:***

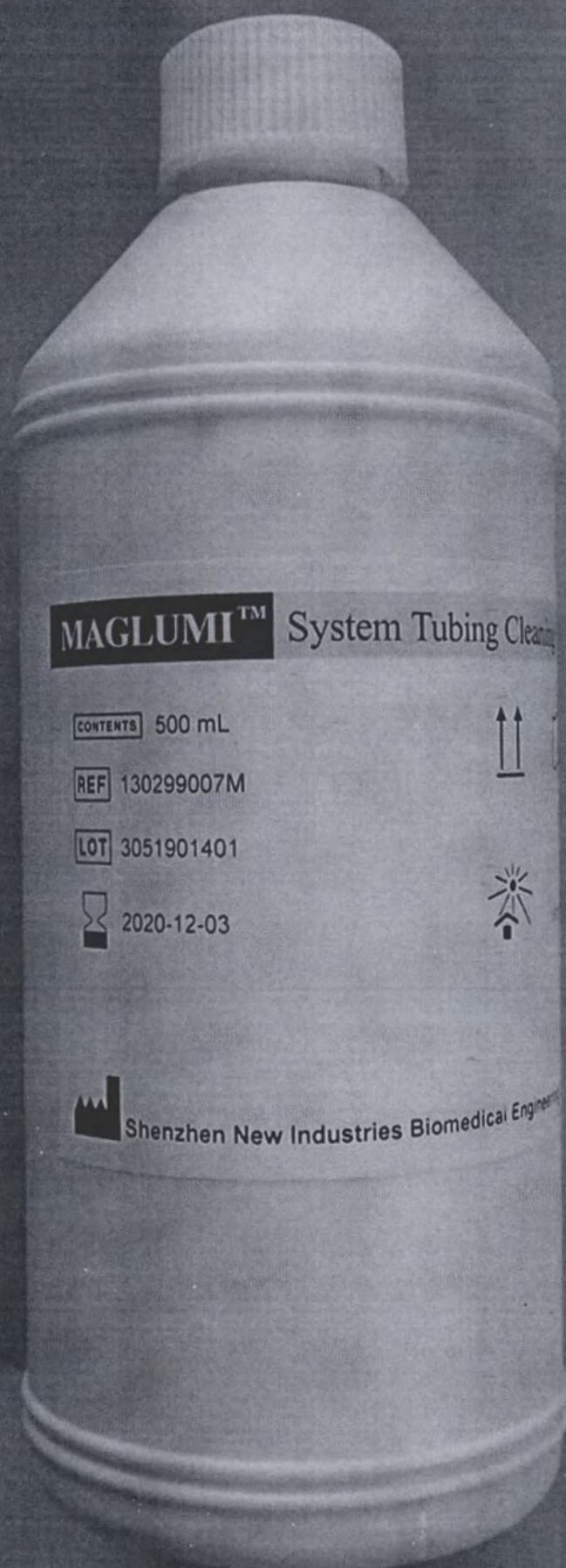

Пустой картридж с 7 отделениями для реагентов

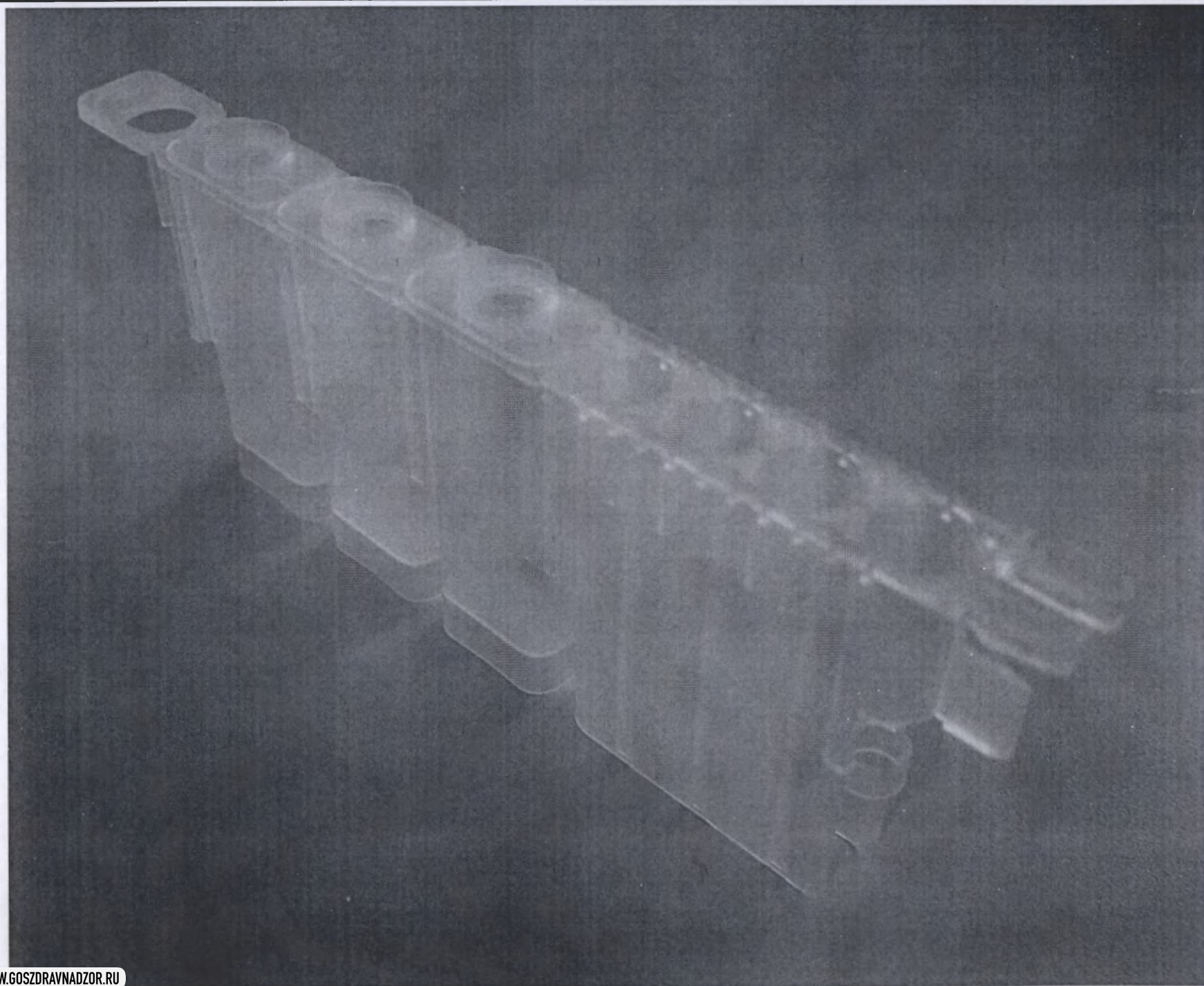

CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**

Инструкция по применению

Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®.

1. ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека. и предназначено для очистки пипет-дизаторов и моечных игл иммунохемилюминесцентных анализаторов MAGLUMI® между тестами и в ходе технического обслуживания.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	1 бутылка - 500 мл
Пустой картридж с 7 отделениями для реагентов	1 шт.
Сертификат контроля качества производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ СОСТАВА

- 1) Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI® в бутылке 500 мл содержит хлорноватистый натрий.
- 2) Пустой картридж с 7 отделениями для реагентов:
Только три пустых отделения картриджа рядом с ручкой предназначены для раствора для очистки системы пробирок, максимальный объем: 25мл каждая.
- 3) Сертификат контроля качества производителя
- 4) Инструкция по применению

4. Необходимое, но не предоставляемые изделия

Материал	REF
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный MAGLUMI® с принадлежностями	23020003 23020007
Набор реагентов in vitro для автоматических анализаторов MAGLUMI®	индивидуально
Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	630003
Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130299004M
Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130299006M
Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	130299007M

5. ХРАНЕНИЕ

- После получения хранить набор при 2-30 °C.
- Беречь от солнечных лучей. Срок годности раствора составляет 12 месяцев с даты изготовления.

