

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Контроль измерений люминесценции (Light Check)
для автоматических анализаторов MAGLUMI®***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


ООО «КЛС»

Смирнов Э.А.

2021 г.



***Контроль измерений люминесценции (Light Check)
для автоматических анализаторов MAGLUMI[®],
в составе:***

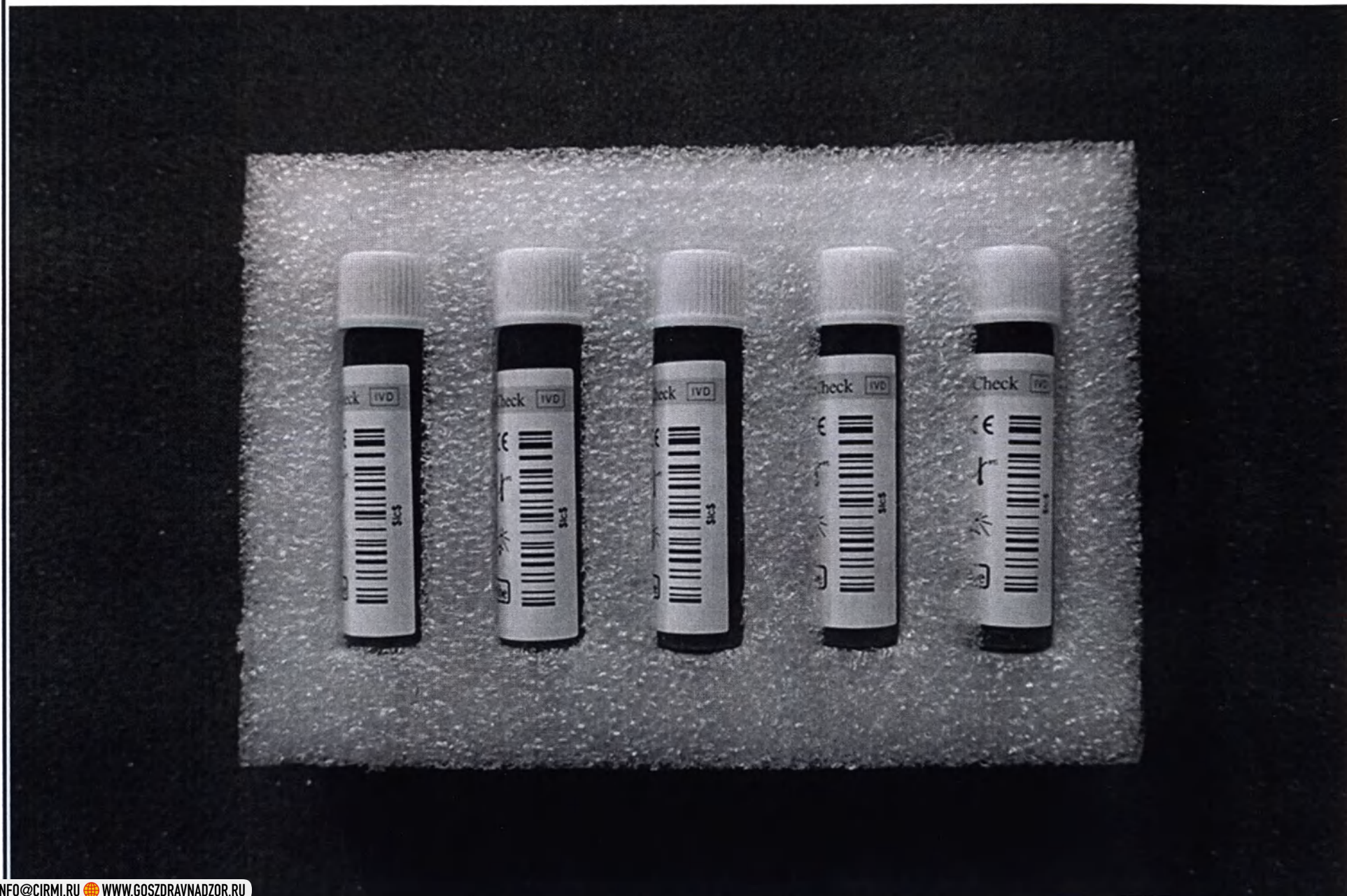


CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

Inspection Qualified & Approved
For Release

Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.

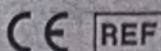

130299006M

Инструкция по применению

Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначено для контроля функциональных характеристик набора реагентов Starter (Starter 1, Starter 2), а также дозирующих и измерительных элементов иммунохемилюминесцентных анализаторов MAGLUMI®.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Данное изделие используется один раз в день перед началом первого измерения, либо всякий раз, когда используется новая партия стартовых реагентов. Этот контроль проверяет правильность функционирования прибора и стартовых реагентов, чтобы избежать ошибок данных из-за дефектов прибора или неправильно расположенных или просроченных стартовых реагентов.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в составе:

Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI® 5 по 2 мл.

Сертификат контроля качества производителя 1 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

4. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	КОНЦЕНТРАЦИЯ
Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов MAGLUMI®	5 флаконов, 2 мл. жидкого реагента в каждом.	АБЭЛ (N-(4-аминобутил)-N-этиллизоломинол)	0.77 мг/мл
		БСА (бычий сывороточный альбумин)	10 мг/мл
Сертификат контроля качества производителя	1 шт.		
Инструкция по применению	1 шт.		

5. НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Материал	REF
Анализатор автоматический	23020003

Инструкция Light Check -V6.D-2019

Всего прошнуровано и
скреплено 5 лист-ов»

