

Фотографии медицинского изделия

(Дополнение)

«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit), LOT: 201224-03 в мазках из носоглотки человека, в вариантах исполнения»

Производства компании NanoBioLife Inc., Корея

1. Пробирка с буфером для разведения биологического образца – 25 шт. (0,3 мл/пробирка.)



2. Стерильный тампон для взятия мазка COVICHEK – 25 шт



Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антигена SARS-CoV-2
(NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit)
в мазках из носоглотки человека



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ

Смотрите видео-инструкцию по использованию набора реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки человека.



СДЕЛАНО В КИТАЕ



TOP
LOT
NANOCARE
COVID-19 AG KIT
Срок годности: 12 месяцев
с даты изготовления

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антигена SARS-CoV-2
(NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit)
в мазках из носоглотки человека



ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 1. В СОСТАВЕ:

1. Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки человека (25 шт.).
2. Инструкция по применению (1 шт.).
3. Сертификат качества (1 шт.).
4. Упаковка (1 шт.).



Полное наименование: Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки человека (25 шт.).

Техническое описание: Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки человека (25 шт.).

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антигена SARS-CoV-2

(NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit)

в мазках из носоглотки человека

25 тестов в наборе



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ

Для того, чтобы посмотреть видео-инструкцию по
использованию набора, нажмите кнопку на сайте
по телефону на QR-код или считайте его приложением
сканером для распознавания QR-кодов



СДЕЛАНО В КОРее

LOT 201224-03




REF SRK-003A

EC REP МДСС ГмбХ
Шинффграбен 41, 30175
Ганновер, Германия
www.mdssar.com

25 тестов в наборе

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антигена SARS-CoV-2
(NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit)
в мазках из носоглотки человека

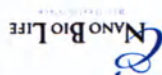

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антигена SARS-CoV-2

(NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit)

в мазках из носоглотки человека




ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 1, В СОСТАВЕ:
Тестовая кассета в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминированной фольги с осушителем – 25 шт.
Пробирка с буфером для разведения биологического образца – 25 шт. (0,5 мл/пробирка)
Насадка с капилляром – 25 шт.
Стерильный тампон для взятия мазка COVID-19 – 25 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

НаноБиоЛайф Инк.
6521, Сидней, шт. Орегон, США
Тел.: +82 2 866 0882 | Факс: +82 2 866 3623 | www.nanobioinc.com


Уполномоченный представитель, продавец:
АО «Р-Фарм»
125154, Москва, ул. Басманная, д. 15, корп. 1
Тел.: +7 495 956 7957 | www.rpharm.com

Регистрационное удостоверение:
№ ПЗН.0000.2020


3. Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit), LOT: 201224-03 в мазках из носоглотки человека. Вариант исполнения 2. Сторона 1.

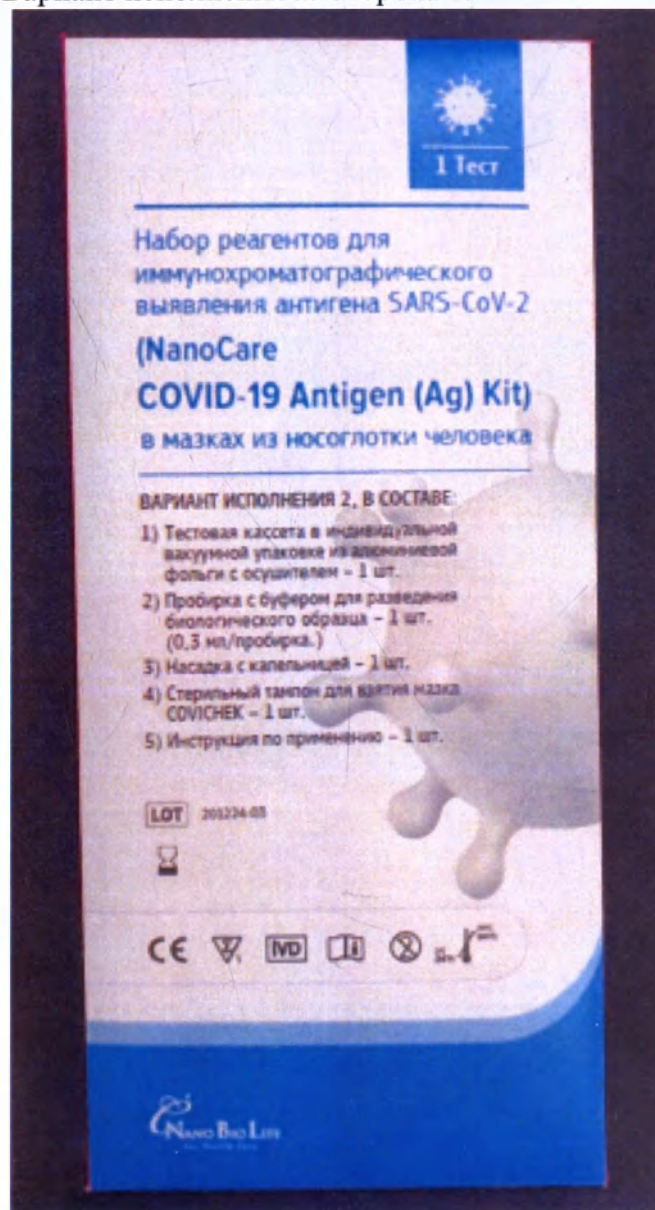


4. Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit), LOT: 201224-03 в мазках из носоглотки человека. Вариант исполнения 2. Сторона 2.

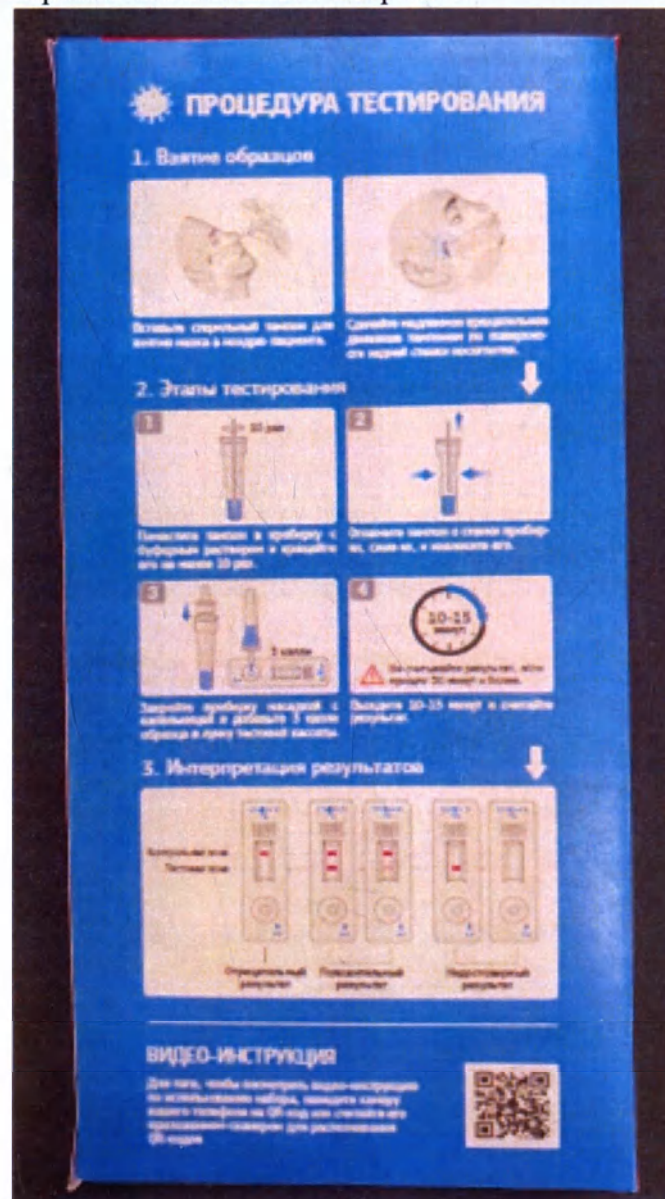


5. Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit), LOT: 201224-03 в мазках из носоглотки человека. Вариант исполнения 2. Сторона 3.

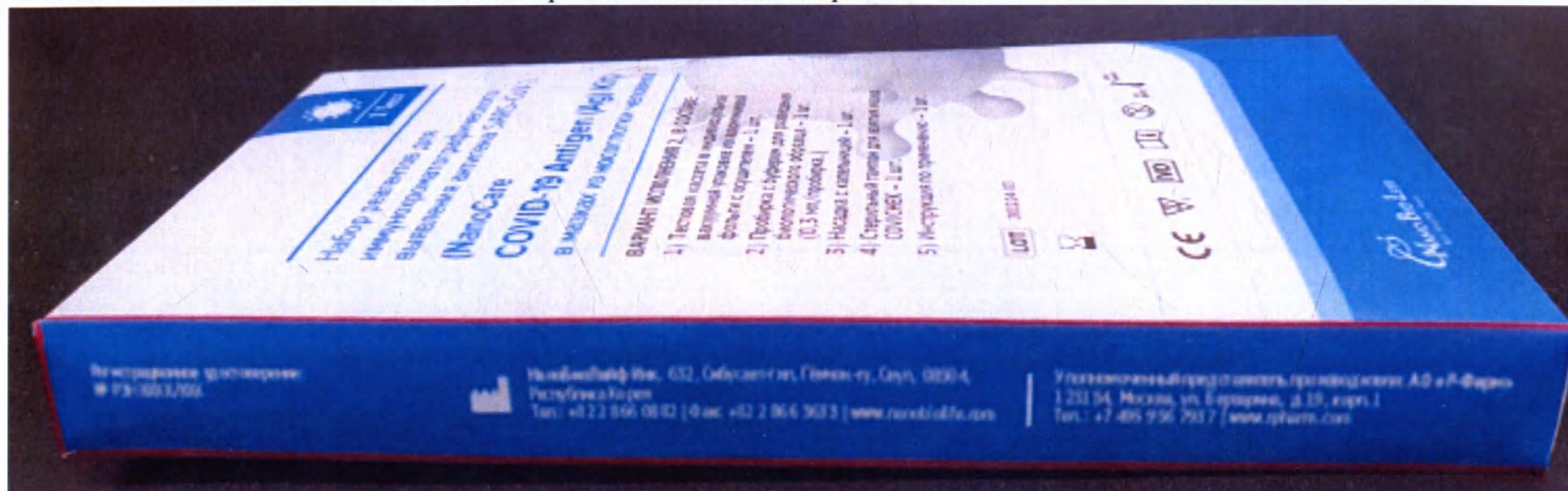

6. Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit), LOT: 201224-03 в мазках из носоглотки человека. Вариант исполнения 2. Сторона 4.

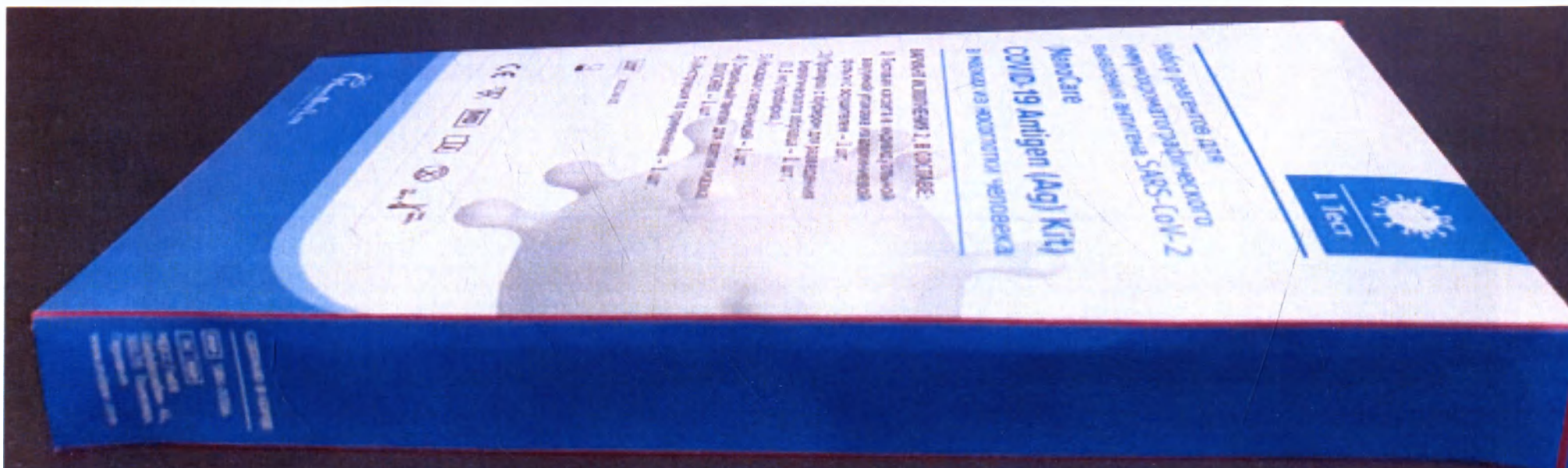

7. Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit), LOT: 201224-03 в мазках из носоглотки человека. Вариант исполнения 2. Сторона 5.

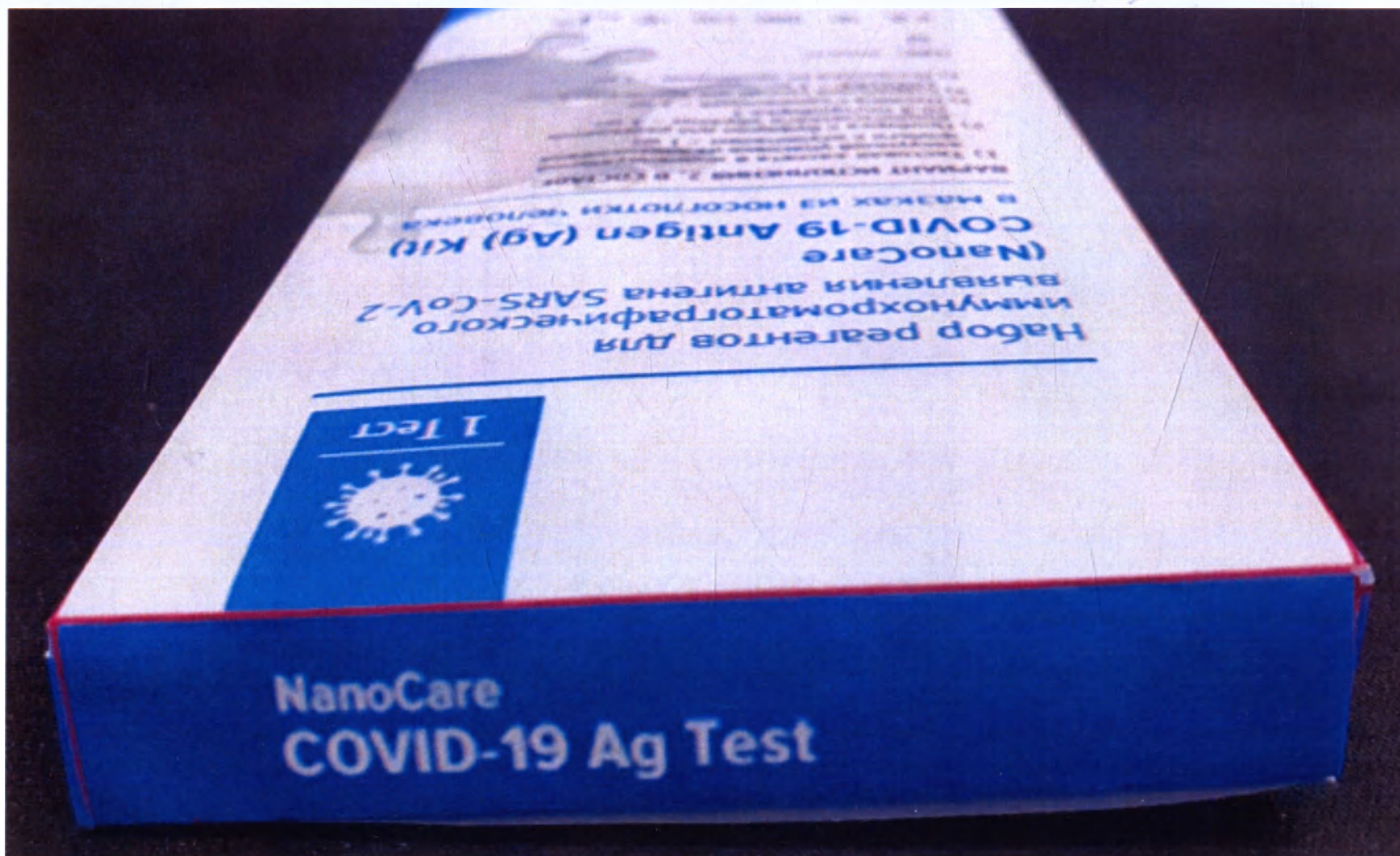



ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Взятие образцов



Вставьте стерильный тампон для взятия мазка в ноздрю пациента.



Сделайте медленное прадатывающее движение тампоном по поверхности задней стенки носоглотки.


2. Этапы тестирования




Поместите тампон в пробирку с буферным раствором и проворачивайте его не менее 10 раз.



Отложите тампон в сторону пробирки, сожмите его, и выжмите его.

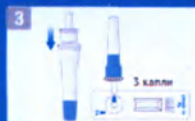

Закройте пробирку насадкой с капельницей и добавьте 3 капли образца в лунку тестовой кассеты.

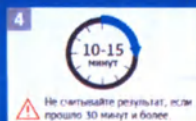

Выждите 10-15 минут и считайте результат.

3. Интерпретация результатов



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ

Для того, чтобы посмотреть видео-инструкцию по использованию набора, наведите камеру вашего телефона на QR код или считайте его приложением сканером для распознавания QR кодов



Регистрационный номер:
ИР РН 1000/001



Нанобайо Лайф Инк. ООО, «БиоСистем», Геленджик, 605004,
Тел: +7 866 956 0332 | Факс: +7 866 5033 | www.nano-bio-life.com

Уполномоченный представитель производителя АО «Фарма-1»
125124, Москва, ул. Басовская, д. 15, кorp. 1,
Тел: +7 495 950 7503 | www.farm-1.com

COVID-19 Ag Test
NanoCare



1 Тест

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit) в мазках из носоглотки человека

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 2, В СОСТАВЕ:

- 1) Тестовая кассета в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем – 1 шт.
- 2) Пробирка с буфером для разведения биологического образца – 1 шт. (0,3 мл/пробирка.)
- 3) Насадка с капельницей – 1 шт.
- 4) Стерильный тампон для взятия мазка COVICHECK – 1 шт.
- 5) Инструкция по применению – 1 шт.

LOT 201224-03



NANO BIO LIFE
Bio-Health Care

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ИЗД. 001.001.001

ИЗД. 001.001.001

ИЗД. 001.001.001

ИЗД. 001.001.001

ИЗД. 001.001.001

ИЗД. 001.001.001

ИЗД. 001.001.001

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12 листов
Подпись _____

