

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Баска»



А.А. Барсукова

«20» января 2021 г.

Костюм изолирующий многоразовый ЛАЙТЕР-про

ТУ 14.12.30-001-25952210-2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОПИЯ
ВЕРНА

Генеральный директор
ООО «Баска»

 Барсукова А.А.

Дата пересмотра: 20.01.2021 г.

1 Наименование медицинского изделия	3
2 Сведения о производителе медицинского изделия.....	3
3 Назначение медицинского изделия, установленное производителем	3
4 Условия применения	4
5 Риски применения медицинского изделия, перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий	4
6 Технические характеристики <i>КОСТЮМА</i>	6
7 Меры предосторожности	9
8 Порядок надевания <i>КОСТЮМА</i>	10
9 Порядок снятия <i>КОСТЮМА</i>	11
10 Техническое обслуживание, текущий ремонт.....	11
11 Информация о стерильном состоянии медицинского изделия, о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения.....	12
12 Комплектность	12
13 Окружающие условия эксплуатации.....	12
14 Транспортирование	12
15 Хранение.....	12
16 Расшифровка символов.....	13
17 Гарантийные обязательства.....	13
18 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	14
19 Перечень применяемых национальных стандартов	14
20 Контактная информация	14
21 Шаблон предоставления сведений о рекламации	15

1 Наименование медицинского изделия

1.1 Наименование медицинского изделия

Костюм изолирующий многоразовый ЛАЙТЕР-про (далее – *КОСТЮМ*).

1.2 Технические условия

ТУ 14.12.30-001-25952210-2020

1.3 Размеры

КОСТЮМ изготавливается в следующих размерах:

Обхват груди типовой фигуры человека, см	Рост типовой фигуры человека, см
88-92	164-170
96-100	170-176
100-104	176-182
104-108	176-182
112-116	182-188
120-124	182-188

2 Сведения о производителе медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Баска»

ООО «Баска»

Юридический адрес: Российская Федерация, 156002, Костромская область, город Кострома, улица Островского, д. 44/7, НП 2, номер 54,55

Фактический адрес: Российская Федерация, 156002, Костромская область, город Кострома, улица Островского, д. 44/7, НП. 2, номер 54,55

Адрес производства: Российская Федерация, 156002, Костромская область, город Кострома, улица Островского, д. 44/7, НП. 2, номер 54,55

Контактные телефоны: +7(4942)630226 +7(910)9564019

E-mail: basca-izo@yandex.ru

3 Назначение медицинского изделия, установленное производителем

КОСТЮМ предназначен для защиты персонала лечебных и санитарных учреждений от возбудителей инфекции, занятых диагностикой и лечением особо опасных инфекций.

КОСТЮМ предназначен для применения медицинским персоналом в помещениях и на улице в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

4 Условия применения

Область применения: профилактика и лечение вирусных/инфекционных заболеваний.

КОСТЮМ предназначен для применения медицинским персоналом в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

5 Риски применения медицинского изделия, перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий

Показания к применению: диагностика и лечение пациентов, зараженных особо опасными инфекциями в целях предотвращения заражения медицинского персонала.

Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы *КОСТЮМА*.

Риски применения медицинского изделия:

1. Время использования костюма должно быть не более 3 часов. В противном случае возможно обезвоживание организма, о чем отдельно даны указания в разделе 7.
2. Использование повреждённого костюма. Запрещено использование поврежденного костюма, о чем отдельно даны указания в разделах 7 и 8.
3. Не соблюдение температурных режимов последовательной обработки и/или стерилизация каким-либо методом может привести к ухудшению и/или

полной потере барьерных свойств, о чем отдельно даны указания в подразделе 6.2.

4. При ухудшении самочувствия, головокружении, тошноте необходимо немедленно прекратить использование костюма, о чём отдельно даны указания в разделе 7.

5. Отсутствие однозначной идентификации костюма, прошедшего последовательную обротку, и указания о хранении таких костюмов отдельно могут привести к повторной контаминации микроорганизмами, о чем даны отдельные указания в разделе 10.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н – 1.

6 Технические характеристики *КОСТЮМА*

6.1 Общие характеристики

6.1.1 *КОСТЮМ* изготавливается из полиэфирной ткани с полиуретановым мембранным покрытием за счет чего обеспечиваются высокие барьерные, водонепроницаемые и водоотталкивающие свойства. *КОСТЮМ* состоит из комбинезона и бахил высоких. *КОСТЮМ* поставляется в нестерильном виде и предназначен для многократного применения. Цвет *КОСТЮМА* должен быть белым с антистатической нитью черного цвета (идущей по основе и утку).

6.1.2 Поверхностная плотность материала, из которого изготовлен *КОСТЮМ* – в диапазоне от 80 до 250 г/м².

6.1.3 Детали *КОСТЮМА* скреплены между собой ниточным швом по ГОСТ 29122-91. Прочность соединительных швов не менее 40 Н.

6.1.4 Прочностные характеристики *КОСТЮМА* следующие:

— Разрывная нагрузка в продольном направлении в сухом состоянии не менее 600 Н.

— Разрывная нагрузка в поперечном направлении в сухом состоянии не менее 500 Н.

— Разрывная нагрузка в продольном направлении в мокром состоянии не менее 600 Н.

— Разрывная нагрузка в поперечном направлении в мокром состоянии не менее 500 Н.

— Раздирающая нагрузка в продольном направлении в сухом состоянии не менее 25 Н.

— Раздирающая нагрузка в поперечном направлении в сухом состоянии не менее 40 Н.

6.1.5 *КОСТЮМ* имеет водоупорность не менее 5000 мм.вод.ст.

6.1.6 *КОСТЮМ* является водоотталкивающим, не менее 80 усл.ед.

6.1.7 *КОСТЮМ* по норме проницаемости микроорганизмами соответствует группе защиты II по ГОСТ 12.4.175-88.

6.1.8 *КОСТЮМ* обладает воздухопроницаемостью не менее 25 дм³/м²·с.

6.2 Обработка костюма для повторного использования (дезинфекция)

КОСТЮМ выдерживает 35 циклов последовательной обработки для повторного использования в следующих режимах:

Дезинфекция методом замачивания (полного погружения) **КОСТЮМА** в одном из следующих растворах и в течении следующего времени:

- 3 % растворе перекиси водорода в течении 60 мин при температуре не ниже 50 °С и не выше 60 °С;
- 1 % раствор «Пероксам ультра¹» в течении 15 мин при температуре не ниже 50 °С и не выше 60 °С;
- или другое дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации и предназначенное для дезинфекции текстильных материалов.

Полоскание без отжима в чистой воде не менее 30 мин.

Сушка на веревке до полного высыхания лицевой и изнаночной сторон **КОСТЮМА** при температуре не выше 40 °С.

1 – производства ООО НПФ «Геникс», Россия.

Примечание: перед первым использованием КОСТЮМ должен быть подвергнут полосканию без отжима в стиральной машине в чистой воде не менее 120 мин при температуре не ниже 50 °С и не выше 60 °С.

ВНИМАНИЕ!

КОСТЮМ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ КАКИМ-ЛИБО МЕТОДОМ!

Стерилизация каким-либо методом или не соблюдение температурных режимов последовательной обработки может привести к ухудшению и/или полной потере барьерных свойств!

Высокие барьерные свойства материала (а именно микробная проницаемость), из которого изготовлен костюм, после воздействия дезинфицирующих средств – подтверждены испытаниями в Федеральном бюджетном учреждении науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора.

6.3 Линейные размеры костюма

Линейные размеры комбинезона соответствуют данным Таблицы 1.

Таблица 1

Наименование измерений	Рост типовой фигуры человека, см	Обхват груди типовой фигуры человека, см						Допуск, ±, см
		88-92	96-100	100-104	104-108	112-116	120-124	
Длина спинки посередине по шаговому, см	164-170	88,0	-	-	-	-	-	2,0
	170-176	-	92,5	-	-	-	-	2,0
	176-182	-	-	95,0	97,0	-	-	2,0
	182-188	-	-	-	-	97,0	99,0	2,0
Длина переда посередине до шагового, см	164-170	75,0	-	-	-	-	-	2,0
	170-176	-	80,0	-	-	-	-	2,0
	176-182	-	-	82,0	84,0	-	-	2,0
	182-188	-	-	-	-	84,0	86,0	2,0
Ширина на уровне подреза, см	164-170	56,0	-	-	-	-	-	2,0
	170-176	-	58,0	-	-	-	-	2,0
	176-182	-	-	61,0	64,0	-	-	2,0
	182-188	-	-	-	-	66,0	70,0	2,0
Длина рукава с плечевым от шва капюшона до низа, см	164-170	76,0	-	-	-	-	-	2,0
	170-176	-	79,0	-	-	-	-	2,0
	176-182	-	-	82,0	82,0	-	-	2,0
	182-188	-	-	-	-	85,0	87,0	2,0
Длина шагового шва, см	164-170	75,0	-	-	-	-	-	2,0
	170-176	-	75,0	-	-	-	-	2,0
	176-182	-	-	76,0	76,0	-	-	2,0
	182-188	-	-	-	-	78,0	78,0	2,0
Ширина рукава внизу, см	164-170	20,0	-	-	-	-	-	2,0
	170-176	-	22,0	-	-	-	-	2,0
	176-182	-	-	22,0	22,0	-	-	2,0
	182-188	-	-	-	-	23,0	23,0	2,0
Ширина брюк внизу, см	164-170	26,0	-	-	-	-	-	2,0
	170-176	-	28,0	-	-	-	-	2,0
	176-182	-	-	28,0	28,0	-	-	2,0
	182-188	-	-	-	-	30,0	32,0	2,0
Высота капюшона, см	164-170	40,0	-	-	-	-	-	2,0
	170-176	-	40,0	-	-	-	-	2,0
	176-182	-	-	41,0	41,0	-	-	2,0
	182-188	-	-	-	-	42,0	42,0	2,0

Линейные размеры бахил должны соответствовать требованиям Таблицы 2.

Таблица 2

Наименование измерений	Обхват груди типовой фигуры человека, см					
	88-92	96-100	100-104	104-108	112-116	120-124
Высота бахилы, см	45,0 - 55,0	45,0 - 57,0	45,0 - 59,0	45,0 - 61,0	45,0 - 63,0	45,0 - 64,0
Длина стопы, см	30,0 - 36,0	31,0 - 37,0	32,0 - 39,0	33,0 - 41,0	35,0 - 44,0	37,0 - 45,0
Длина завязок, см	(65,0±10)	(65,0±10)	(65,0±10)	(65,0±10)	(65,0±10)	(65,0±10)

7 Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТЮМА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ! В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ: ДЕЗИНФЕКЦИЮ, ПОЛОСКАНИЕ И СУШКУ В РЕЖИМАХ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТЮМА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ. ТАКОЙ КОСТЮМ ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 18.

ВНИМАНИЕ! КОСТЮМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДЕЖДОЙ ВТОРОГО СЛОЯ – ДОЛЖЕН НАДЕВАТЬСЯ ПОВЕРХ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ.

ВНИМАНИЕ! КОСТЮМ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОРГАНИЗМА!

ВНИМАНИЕ! ПРИ УХУДШЕНИИ САМОЧУВСТВИЯ, ГОЛОВОКРУЖЕНИИ, ТОШНОТЕ – НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТЮМА.

ВНИМАНИЕ! ДАЛЬНЕЙШИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО НАДЕВАНИЮ КОСТЮМА ОТНОСЯТСЯ ТОЛЬКО К «КОСТЮМУ ИЗОЛИРУЮЩЕМУ МНОГОРАЗОВОМУ ЛАЙТЕР-про ПО ТУ 14.12.30-001-25952210-2020.

8 Порядок надевания *КОСТЮМА*

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ИНСТРУКЦИЙ ПО НАДЕВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ ДЛЯ НАДЕВАНИЯ И СНЯТИЯ *КОСТЮМА* И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ НА ЭТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

8.1 Извлечь костюм из упаковки, убедившись в её целостности.

8.2 Надеть рабочую одежду.

8.3 Убедиться в целостности костюма при каждом надевании.

8.4 Взять в руки комбинезон и приступить к аккуратному одеванию брюк, стараясь не касаться изделием пола.

8.5 Надеть рукава комбинезона (запрещено надевать одновременно оба рукава во избежание разрывов комбинезона).

8.6 Надеть комбинезон. При этом надевая рукава, накинуть на большой палец петлю-напальчник.

8.7 Надеть капюшон.

8.8 Застегнуть комбинезон, взяв молнию левой рукой за нижнюю часть, потянув вниз, расправляя. Далее, правой рукой, ухватив за собачку, застегнуть молнию вверх до конца.

8.9 Надеть бахилы, убедившись, что брючины комбинезона заправлены вниз. Завязать нижние завязки для дополнительной фиксации.

9 Порядок снятия *КОСТЮМА*

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ИНСТРУКЦИЙ ПО СНЯТИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ ДЛЯ НАДЕВАНИЯ И СНЯТИЯ *КОСТЮМА* И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ НА ЭТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

9.1 Снимите капюшон, осторожно собирая и заворачивая наружной стороной внутрь.

9.2 Снимите рукава комбинезона.

9.3 Снимите комбинезон с бахилами так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая – внутри. Не расправляя, погрузите комбинезон в емкость с дезинфицирующим раствором.

10 Техническое обслуживание, текущий ремонт

КОСТЮМ является нестерильным медицинским изделием многократного применения. Ремонту не подлежит.

После каждого использования необходимо провести последовательную обработку для повторного использования: дезинфекцию, полоскание и сушку в режимах по подразделу 6.2.

ВНИМАНИЕ! *КОСТЮМ* ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ В УСЛОВИЯХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВТОРИЧНУЮ КОНТАМИНАЦИЮ МИКРООРГАНИЗМАМИ!

***КОСТЮМ*, ПРОШЕДШИЙ ОБРАБОТКУ – ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДНОЗНАЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАН С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КОНТАМИНАЦИИ МИКРООРГАНИЗМАМИ.**

11 Информация о стерильном состоянии медицинского изделия, о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения
КОСТЮМ является нестерильным медицинским изделием многократного применения. При изготовлении *КОСТЮМА* не используются лекарственные средства, материалы животного и (или) человеческого происхождения.

12 Комплектность

Минимальный комплект поставки *КОСТЮМА* состоит из:

- Комбинезон одного размера – 1 шт.
- Бахилы высокие одного размера – 1 пара.
- Инструкция по применению – 1 экз.
- Потребительская упаковка – 1 экз.

13 Окружающие условия эксплуатации

Температура – от минус 10 до 25 °С.

Относительная влажность – от 40 до 80 % при 25 °С.

Атмосферное давление – (84,0 – 106,7) кПа [(630-800) мм рт. ст.].

14 Транспортирование

Транспортировать *КОСТЮМ* следует в транспортной упаковке транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

15 Хранение

КОСТЮМ должен храниться в потребительской упаковке в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 не более 3 лет после изготовления.

В процессе хранения *КОСТЮМ* в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

16 Расшифровка символов



НЕ ОТБЕЛИВАТЬ



СТИРКА ЗАПРЕЩЕНА



СУШКА НА ВЕРЁВКЕ ИЛИ ВЕШАЛКЕ ПОСЛЕ СТИРКИ БЕЗ ОТЖИМА

ПРИМЕЧАНИЕ: ЧИТАТЬ КАК «СУШКА НА ВЕРЁВКЕ ИЛИ ВЕШАЛКЕ ПОСЛЕ ПОЛОСКАНИЯ БЕЗ ОТЖИМА» ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 40 °C



НЕ СТЕРИЛЬНО



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ХРАНЕНИЯ



ДИАПАЗОН ВЛАЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ



ОГРАНИЧЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ

17 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие *КОСТЮМА* всем требованиям при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения, установленных настоящей инструкцией по применению.

Гарантийный срок хранения *КОСТЮМА* до использования – 3 года с даты производства.

18 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

Утилизация *КОСТЮМА* осуществляется на общих основаниях и в соответствии с требованиями согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Использованный *КОСТЮМ*, после 35 циклов последовательной обработки для повторного применения, должен быть утилизирован как медицинские отходы класса «В» в соответствии с классификацией по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Не использованный *КОСТЮМ* со следами повреждений или с истекшим сроком годности должен быть утилизирован в потребительской упаковке как медицинские отходы класса «А» в соответствии с классификацией по СанПиН 2.1.7.2790-10.

19 Перечень применяемых национальных стандартов

Отсутствуют национальные стандарты предъявляющие требования к *КОСТЮМУ* для проверки правильности установки (монтажа) медицинского изделия и его готовности к безопасной работе/эксплуатации.

20 Контактная информация

По вопросам качества медицинского изделия «Костюм изолирующий многоразовый ЛАЙТЕР-про» по ТУ 14.12.30-001-25952210-2020, производства ООО «Баска», обращаться по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Баска»

ООО «Баска»

Юридический адрес: Российская Федерация, 156002, Костромская область, город Кострома, улица Островского, д. 44/7, НП 2, номер 54,55

Фактический адрес: Российская Федерация, 156002, Костромская область, город Кострома, улица Островского, д. 44/7, НП. 2, номер 54,55

Адрес производства: Российская Федерация, 156002, Костромская область, город Кострома, улица Островского, д. 44/7, НП. 2, номер 54,55

Контактные телефоны: +7(4942)630226 +7(910)9564019

E-mail: basca-izo@yandex.ru

21 Шаблон предоставления сведений о рекламации

Письмо-претензия (по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № _____
" ____ " _____ 20__ г.

Куда _____
(наименование организации)

Кому _____
(Ф.И.О. руководителя)

ПРЕТЕНЗИЯ № _____

На основании договора № _____ от " ____ " _____ 20__ г., накладной № _____ от
" ____ " _____ 20__ г., счету № _____ от " ____ " _____ 20__ г. в адрес

_____ (наименование организации, которая предъявляет претензию)
поступили товары _____

_____ (наименование товаров)
по цене _____ руб. в количестве _____ на сумму _____ руб.

Данные товары поступили _____
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету,
значится: _____

Фактически оказалось _____

Брак (недостача) на сумму _____ руб. образовался(сь) по вине поставщик
(перевозчика, изготовителя).

Данный факт подтверждается актом № _____ от " ____ " _____ 20__ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. _____ договора № _____ от
" ____ " _____ 20__ г.,

ПРОШУ:

Убытки в сумме _____ руб.,
(стоимость бракованного или недостающего товара)

_____ % штрафа в сумме _____ руб., транспортные расходы в сумме
_____ руб., расходы по экспертизе в сумме _____ руб.,

всего в сумме _____ руб. перечислить на наш расчетный счет
№ _____ в _____ г. _____

(наименование банка)

Приложения:

1. Акт приемки товара № _____.
2. Удостоверение представителя _____ № _____ от " ____ " _____ 20__ г.
3. Товаротранспортная накладная № _____
4. Другие документы, обосновывающие претензию на _____ листах.

Руководитель предприятия _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15 листов
Генеральный директор ООО
«Баска» пятнадцать
А.А. Барсукова

