

To be submitted to the Competent Health Authorities in Russian Federation

I herewith confirm that the content of **the Instruction for use** of the medical device **"Extendable, adjustable, inextensible medical bandage «VARİTEKS»"** is valid and true.

VARİTEKS ORTOPEDİ SANAYİ A.Ş., located at: **Maltepe Mah. Aile Bahçe Sok. Litros Yolu No. 10, Zeytinburnu, İstanbul, Turkey** is the developer and the original manufacturer of the device mentioned in the document.

Appointed by:

Bedri Okan Öztürkatalay

On behalf of and as the authorized signatory of:

VARİTEKS ORTOPEDİ SANAYİ A.Ş.

Signature

Date 04.12.2020



MÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILMAZ



 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Бандаж медицинский «VARİTEKS» растяжимый,
регулируемый, нерастяжимый»**

VARİTEKS ORTOPEDİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ /

ВАРИТЭКС ОРТОПЕДИ САНАЙИ АНОНИМ ЩИРКЕТИ, Турция

2020

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия	3
2. Состав медицинского изделия.....	3
3. Общее описание медицинского изделия.....	6
4. Назначение медицинского изделия	7
5. Область применения	7
6. Показания	7
7. Противопоказания	8
8. Возможные побочные действия.....	9
9. Принцип действия	9
10. Указания по применению	9
11. Техническое описание медицинского изделия.....	10
12. Способ применения медицинского изделия	140
13. Ограничение применения	140
14. Условия применения	140
15. Меры предосторожности при применении.....	140
16. Перечень опасностей, связанных с применением медицинского изделия, анализ рисков	140
17. Материалы изготовления изделия	141
18. Правила эксплуатации, требования безопасности	141
19. Требования к охране окружающей среды.....	142
20. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки.....	142
21. Стерильность, методы стерилизации	142
22. Международные стандарты.....	142
23. Комплектность поставки	143
24. Упаковка и маркировка медицинского изделия.....	143
25. Условия транспортировки и хранения медицинского изделия, срок годности	163
26. Гарантийные обязательства.....	163
27. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия....	163
28. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	163
29. Рекламация	163
30. Адреса производства.....	164

1. Наименование медицинского изделия

«Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый»
(далее по тексту – бандаж, изделие, медицинское изделие, медицинское изделие «VARITEKS»).

2. Состав медицинского изделия

Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый имеет следующие варианты исполнения в соответствующих группах:

I. Бандаж растяжимый:

1. Код 350 (размер универсальный/universal);
2. Код 355 (размер универсальный/universal);
3. Код 400 (размер универсальный/universal);
4. Код 406 (размер 6 см х 2 м);
5. Код 408 (размер 8 см х 2 м);
6. Код 410 (размер 10 см х 2 м);
7. Код 412 (размер 12 см х 2 м);
8. Код 415 (размер 15 см х 2 м);
9. Код 451 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
10. Код 452 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
11. Код 453 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
12. Код 455 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
13. Код 456 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
14. Код 458 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
15. Код 462 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
16. Код 474 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
17. Код 475 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
18. Код 560 (цвет: красный; жесткий);
19. Код 560 (цвет: синий; средней жесткости);
20. Код 560 (цвет: зеленый; мягкий);
21. Код 564 (размер 1-2/S-M, 3-4/L-XL);
22. Код 565 (размер 1-2/S-M, 3-4/L-XL);
23. Код 721 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
24. Код 722 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
25. Код 723 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
26. Код 724 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
27. Код 725 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
28. Код 801 (размер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
29. Код 802 (размер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
30. Код 803 (размер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
31. Код 804 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
32. Код 805 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
33. Код 806 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
34. Код 820 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
35. Код 822 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
36. Код 849 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
37. Код 953 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL, 6/ XXXL);
38. Код 975 (размер: 36-40/S-M, 40-45/L-XL);
39. Код 977 (размер: 36-40/S-M, 40-45/L-XL);
40. Код 979 (размер: 36-40/S-M, 40-45/L-XL);

II. Бандаж регулируемый:

1. Код 119 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
2. Код 160 (размер универсальный/universal);
3. Код 163 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
4. Код 164 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
5. Код 165 (левый / правый, размер: 1/S, 2/M, 3/L);
6. Код 188 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
7. Код 300 (размер 1/S, 3/L);
8. Код 301 (левый / правый, размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
9. Код 302 (размер: 0/XS (детский), 1/S, 2/M, 3/L);
10. Код 302K (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
11. Код 303 (размер: универсальный/universal: детский, взрослый);
12. Код 304 (размер: универсальный/universal: детский, взрослый);
13. Код 305 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
14. Код 306 (левый / правый, размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
15. Код 307 (левый / правый, размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
16. Код 308 (размер: универсальный/universal);
17. Код 309 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
18. Код 312 (размер универсальный/universal);
19. Код 313 (размер универсальный/universal);
20. Код 314 (размер: маленький/small, большой/big)
21. Код 315 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
22. Код 319 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
23. Код 323 (размер универсальный/universal);
24. Код 460 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
25. Код 465 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
26. Код 510 (размер универсальный/universal);
27. Код 511 (размер универсальный/universal);
28. Код 760 (размер универсальный/universal);
29. Код 823 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
30. Код 824 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
31. Код 825 (левый / правый, размер: 0/XS (детский), 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
32. Код 827 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
33. Код 829 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
34. Код 834 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
35. Код 842 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
36. Код 854 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
37. Код 863 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
38. Код 879 (размер универсальный/universal);
39. Код 880 (размер универсальный/universal);
40. Код 881 (размер универсальный/universal);
41. Код 882 (размер: универсальный/universal: детский, взрослый);
42. Код 883 (размер универсальный/universal);
43. Код 884 (размер универсальный/universal);
44. Код 885 (размер: универсальный/universal: детский, взрослый);
45. Код 886 (размер универсальный/universal);
46. Код 887 (размер: универсальный/universal: детский, взрослый);
47. Код 888 (размер универсальный/universal);
48. Код 892 (размер универсальный/universal);
49. Код 893 (размер: универсальный/universal);
50. Код 894 (размер: универсальный/universal: детский, взрослый);

51. Код 897 (размер: универсальный/universal: детский, взрослый);

III. Бандаж нерастяжимый

1. Код 311 (левый / правый, размер S-M, L-XL);
2. Код 320 (размер детский: 20, 25, 30, 35; размер взрослый: 40, 50, 60, 70);
3. Код 331 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
4. Код 332 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
5. Код 333 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
6. Код 334 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
7. Код 335 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
8. Код 336 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
9. Код 340 (размер: 1-2/S-M, 3-4/L-XL);
10. Код 345 (размер: 1-2/S-M, 3-4/L-XL);
11. Код 454 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
12. Код 501 (размер: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);
13. Код 541 (размер 0/XS, 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
14. Код 542 (размер 0/XS, 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
15. Код 543 (размер 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
16. Код 544 (размер 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
17. Код 545 (размер 1/S, 2/M, 3/L);
18. Код 546 (размер 1-2/S-M, 3-4/L-XL);
19. Код 547 (размер 1/S, 2/M, 3/L);
20. Код 548 (размер 1-2/S-M, 3-4/L-XL);
21. Код 549 (размер универсальный/universal);
22. Код 550 (размер универсальный/universal);
23. Код 551 (размер универсальный/universal);
24. Код 552 (размер универсальный/universal);
25. Код 553 (левый / правый, размер универсальный/universal);
26. Код 554 (размер универсальный/universal);
27. Код 582 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
28. Код 584 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
29. Код 589 (размер 1-2/S-M, 3-4/L-XL);
30. Код 590 (размер 1-2/S-M, 3-4/L-XL);
31. Код 591 (размер: 1-2/S-M, 3-4/L-XL);
32. Код 593 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
33. Код 594 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
34. Код 814 (размер универсальный/universal);
35. Код 815 (размер универсальный/universal);
36. Код 816 (размер универсальный/universal);
37. Код 828 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
38. Код 833 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL);
39. Код 844 (размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
40. Код 858 (размер универсальный/universal);
41. Код 859 (левый / правый, размер: универсальный/universal: детский, взрослый);
42. Код 860 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
43. Код 864 (размер: 1/S, 2/M, 3/L);
44. Код 865 (левый / правый, размер: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL);
45. Код 898 (размер универсальный/universal).

3. Общее описание медицинского изделия

«Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый», представляет собой ортопедическое медицинское изделие со стяжками, поясами, пелотами и застежками, которое используется для поддержки, фиксации или иммобилизации верхних и нижних конечностей в процессе лечения деформаций, повреждений мягких тканей, растяжений, переломов, а также для послеоперационного восстановления конечностей.

Медицинское изделие включает в себя:

- растяжимые бандажи из эластичной ткани, которые мягко фиксируют конечности, оказывают поддерживающее действие, также могут обладать микромассажным эффектом. Применяются они в основном при легком растяжении мышц и связок, для профилактики отеков, для профилактики растяжений при выполнении физических упражнений, а также при лечении повреждений мягких тканей и для восстановления моторики верхних конечностей;

- регулируемые бандажи выполнены из более плотных материалов, помогают обеспечить движение конечностей в нужной- более короткой- амплитуде, способствуют более выраженной, по сравнению с растяжимыми бандажами, фиксации конечностей. Применяются они в основном при нестабильности суставов, для консервативного и послеоперационного лечения вальгусных деформаций;

- нерастяжимые бандажи жестко фиксируют (иммобилизуют) конечности в нужном положении, применяются при выраженной нестабильности суставов, для консервативного лечения плоскостопия, пяточной шпоры; для консервативного и послеоперационного лечения вальгусных деформаций.

Бандажи поставляются в нестерильном виде и не подлежат стерилизации.

Часть вариантов исполнения представлено в одном универсальном размере, часть- имеет размерный ряд.

Размеры имеют следующие обозначения: универсальный/universal взрослый, универсальный/universal детский, 0/XS, 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL, 6/XXXL, или обозначаются цифрами (стельки и носки имеют размеры, соответствующие размерам обуви от 18 до 46). Допускается обозначение размера в виде интервала.

Варианты исполнения для верхних и нижних конечностей являются универсальными- подходят одновременно как для левых, так и для правых конечностей, за исключением вариантов исполнения с кодами: 165, 301, 306, 307, 311, 553, 825, 859, 865, у которых изделия для правых конечностей зеркально симметричны изделиям для левых конечностей. Варианты исполнения с кодами, 501, 511, 541, 542, 543, 544, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 582, 584, 589, 590, 591, 593, 594, 801, 802, 803, 802953, 975, 977, 979 поставляются в упаковке попарно: по одному изделию для правой конечности и по одному для левой в одной упаковке.

Медицинское изделие «VARITEKS» идентифицируется по коду, указанному на ярлыке изделия, маркировке первичной и потребительской упаковки.

Бандаж медицинский «VARITEKS» относится к группе изделий повседневного использования и использования в условиях лечебных учреждений.

4. Назначение медицинского изделия

Назначение «Бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого»:

Для поддержки или иммобилизации верхних и нижних конечностей в процессе лечения деформаций, повреждений мягких тканей, растяжений, переломов; послеоперационное восстановление конечностей.

5. Область применения

Областью медицинского применения медицинского изделия «Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый», является профилактика и консервативное лечение заболеваний суставов, мышц, связок и мягких тканей конечностей.

6. Показания

Показаниями к применению бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого являются:

- Растяжение мышц и связок;
- Воспалительные заболевания суставов;
- Артралгия;
- Травмы суставов;
- Консервативное лечение вывихов суставов;
- Реабилитация после операции на суставах.

Уточненными показаниями к применению бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого являются:

- Профилактика растяжений при выполнении физических упражнений;
- Лечение повреждений мягких тканей;
- Профилактика отеков;
- Восстановление моторики верхних конечностей.

Уточненными показаниями к применению бандажа медицинского «VARITEKS» регулируемого являются:

- Фиксация конечности в нужном положении;
- Фиксация суставов в нужном положении;
- Нестабильность суставов;
- Консервативное и послеоперационное лечение вальгусной деформации первого пальца стопы.

Уточненными показаниями к применению бандажа медицинского «VARITEKS» нерастяжимого являются:

- Нестабильность суставов;
- Фиксация конечностей в нужном положении;
- Фиксация суставов в нужном положении;
- Иммобилизация суставов;
- Лечение повреждений мягких тканей стопы;
- Консервативное лечение плоскостопия;
- Консервативное лечение пяточной шпоры;
- Консервативное и послеоперационное лечение вальгусной деформации первого пальца стопы.

7. Противопоказания

Абсолютными противопоказаниями к применению бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого являются:

- повышенная чувствительность к материалам изготовления изделия;
- проблемы артериального кровообращения нижних и верхних конечностей;
- тяжелые формы облитерирующих заболеваний артерий нижних и верхних конечностей;
- трофические язвы;

Относительными противопоказаниями к применению бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого являются:

- сахарный диабет;
- тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии;
- острая инфекция кожи и мягких тканей;
- себорейный дерматит;
- потеря чувствительности в конечностях.

Компания производитель «VARITEKS ORTOPEDI SANAYI A.Ş.» не несет ответственности за любое использование медицинского изделия «VARITEKS» в случае наличия у пациента любого из вышеуказанных противопоказаний.

8. Возможные побочные действия

Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый может оказывать следующие возможные побочные действия:

- • приносить неудобство во время ношения в результате неправильного измерения тела при подборе медицинского изделия;
- • быть опасным при использовании не по назначению и без соблюдения таблицы определения размера.

При развитии сыпи, продолжительной боли и чувстве дискомфорта необходимо прекратить использование медицинского изделия и проконсультироваться с врачом.

9. Принцип действия

Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, накладывается на поврежденную конечность в виде фиксирующей повязки разной степени эластичности, которая используется для ее поддержки, фиксации или иммобилизации.

10. Указания по применению

Перед использованием бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого необходимо:

- проконсультироваться с врачом;
- внимательно прочитать инструкцию по применению;
- убедиться в отсутствии повреждений у упаковки и изделия.

При выборе размера необходимо руководствоваться таблицами определения размера, расположенными на потребительской упаковке.

Не рекомендуется использовать изделие, не соответствующее размеру, указанному в таблице.

Изделие должно располагаться на теле также, как это изображено на фотографии с потребительской упаковки.

Условия применения:

Медицинские изделия «VARITEKS» эксплуатируются при температуре от -20 до +60 °С, относительной влажности от 10 до 100%.

При использовании медицинского изделия необходимо соблюдать рекомендации врача и не носить их более 16 часов в день.

Перед одеванием изделия конечности должны быть сухими, любые открытые раны необходимо закрыть стерильной повязкой.

Необходимо избегать контакта изделий с косметическими средствами или химикатами.

Рекомендуется заменять изделия после 6 месяцев ежедневного ношения.

Условия стирки

Медицинские изделия необходимо стирать по мере загрязнения. Перед стиркой изделия рекомендуется ознакомиться с информацией, расположенной на ярлыке изделия, или с инструкцией, расположенной на потребительской упаковке.

Рекомендуется ручная стирка, запрещается использовать горячую воду (>30°C), моющие средства, содержащие хлор, т.к. это может привести к порче изделия.

Запрещается использовать машинную стирку, химическую чистку, отбеливание, отжимание скручиванием, машинную сушку, глажение и обработку паром.

После стирки изделие необходимо тщательно прополоскать, аккуратно отжать руками не скручивая и положить сушиться на полотенце в растянутом горизонтально виде в хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре.

Не рекомендуется оставлять влажное изделие лежать на полотенце под прямыми солнечными лучами. Не рекомендуется сушить изделие на отопительной батарее.

Температура и относительная влажность воздуха должны соответствовать комнатным условиям или быть приближенными к ним.

Меры предосторожности:

Бандаж предназначен строго для индивидуального использования.

Изделие поставляется в нестерильном виде и стерилизации не подлежит.

Необходимо внимательно осмотреть изделие на предмет отсутствия повреждений содержимого и упаковки, которые могли возникнуть при транспортировке.

В случае обнаружения повреждений, использование изделия не допускается.

Запрещается тянуть и срезать какие-либо нитки на изнаночной стороне изделия, чтобы избежать случайного повреждения изделия.

11. Техническое описание медицинского изделия

Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый представлен следующими вариантами исполнения, которые распределены в группы:


- I. Бандаж растяжимый;
- II. Бандаж регулируемый;
- III. Бандаж нерастяжимый.

Группа I. Бандаж растяжимый представлена следующими вариантами исполнения:

Код 350 - Устройство для реабилитации кисти

Предназначено для восстановления моторики верхних конечностей, изготовлено из пористого бутадиен-стирольного каучука. Устройство зажимается в кулаке, который сжимается и разжимается, при периодическом выполнении упражнения мышцы пальцев становятся сильнее.

Устройство предназначено для лиц старше 18 лет, представлено в одном черном цвете, в одном универсальном размере и в одном варианте твердости.

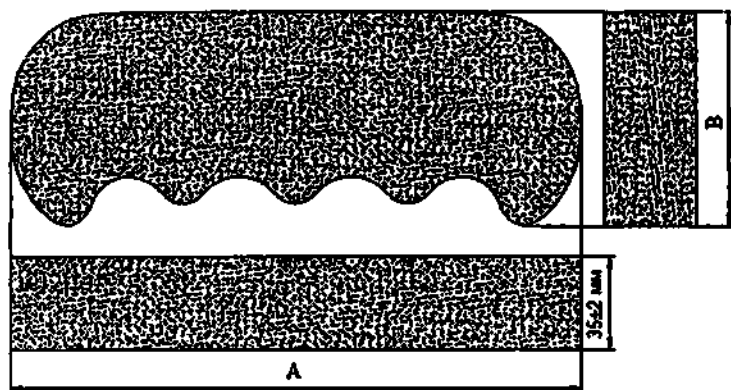


A, см	B, см	Масса изделия нетто, г	Масса изделия брутто, г
11,5±0,2	5,5±0,2	24,8±0,5	44,8±0,5

Код 355 Комплект для реабилитации кисти

Предназначен для восстановления моторики верхних конечностей, представляет собой резиновый баллон с клапаном, покрытый тканью из полиамида, баллон заполняется воздухом, фиксируется в кулаке с помощью текстильных ремней, далее кулак с баллоном сжимается и разжимается, при периодическом выполнении данного упражнения мышцы пальцев становятся сильнее.

Устройство предназначено для лиц старше 18 лет, представлено в одном черном цвете и в одном универсальном размере, твердость изделия варьирует в зависимости от количества воздуха, закаченного внутрь баллона- чем больше объем закаченного воздуха, тем выше твердость и большее усилие требуется для выполнения упражнения.

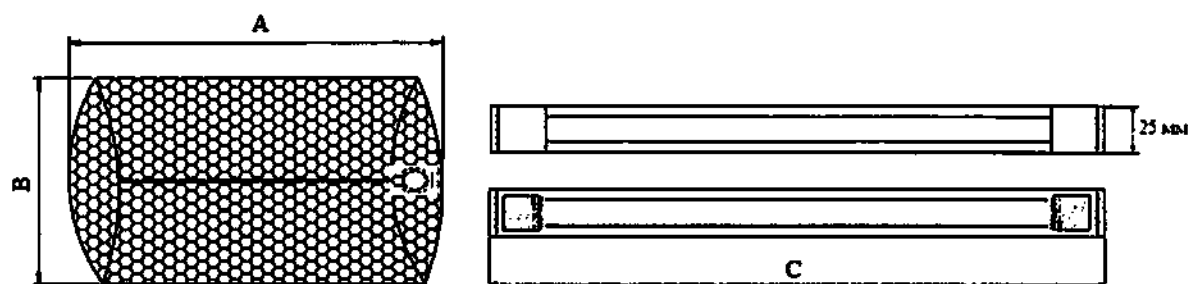


A, см	B, см	C, см	Масса изделия нетто, г	Масса изделия брутто, г
11,5±0,2	9,5±0,2	45,0±0,5	54±0,5	74±0,5

Код 400 Трубчатый бандаж в рулоне

Предназначен для легкой поддержки и лечения повреждений мягких тканей в районе локтя, кисти, колена и голеностопного сустава. Представляет собой тонкую трикотажную трубку с черного или бежевого цвета. От трубки отрезается кусок нужной длины, который в дальнейшем используется, как замкнутая эластичная повязка на локоть, запястье, колено или голеностопный сустав.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном универсальном размере, в свернутом в рулон виде, длина рулона 20 м.

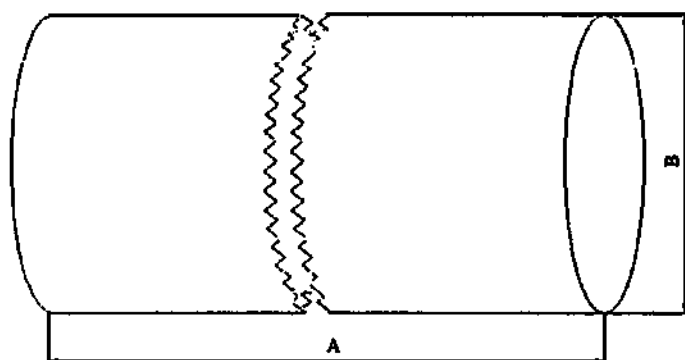


Длина А, см	Диаметр В, см	Масса изделия нетто, г	Масса изделия брутто, г
2000±10	4,5±0,2	487±10	569±10

Коды: 406, 408, 410, 412, 415- Эластичные бинты

Предназначены для поддержки рук, запястий, ног и голеностопных суставов. Представляют собой трикотажную полосу шириной 6 / 8 / 10 / 12 / 15 см длиной 200 см бежевого цвета, которая используется в качестве эластичной повязки на любые участки верхних и нижних конечностей.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, каждому коду соответствует один вариант ширины.

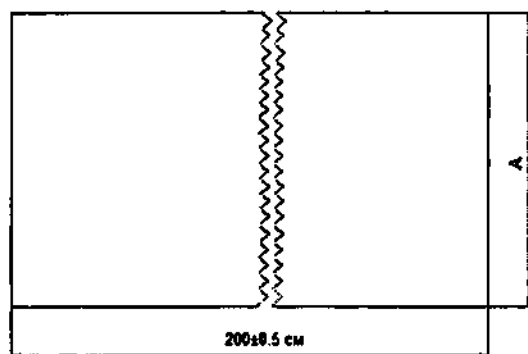


Код изделия	406	408	410	412	415
Ширина изделия А, см	6±0,5	8±0,5	10±0,5	12±,5	15±0,5
Масса нетто, г	32±0,5	40,2±0,5	56,6±0,5	70,2±0,5	77,4±0,5
Масса брутто, г	43,6±0,5	54,4±0,5	70,6±0,5	85,4±0,5	94,8±0,5

Код 451 Бандаж на бедро трикотажный гибкий

Предназначен для лечения растяжений и воспалительных заболеваний мышц бедра. Представляет собой бесшовную трикотажную трапециевидную трубку, которая используется в качестве замкнутой эластичной повязки на бедро.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из обхвата середины бедра пациента.

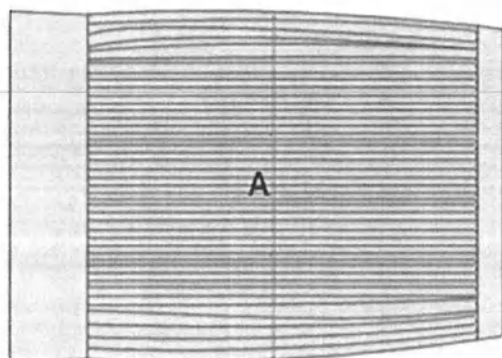


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность бедра, см	34-40	40-46	46-52	52-58
Длина А, см	18±0,5	19±0,5	20±0,5	21±0,5
Масса нетто, г	155,1±2	162,2±2	175,3±2	178,1±2
Масса брутто, г	205,1±2	212,2±2	225,3±2	228,1±2

Код 452 Бандаж на голень трикотажный гибкий

Предназначен для лечения растяжений и воспалительных заболеваний мышц голени. Представляет собой бесшовную трикотажную трапециевидную трубку, которая используется в качестве замкнутой эластичной повязки на голень.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из обхвата голени пациента.

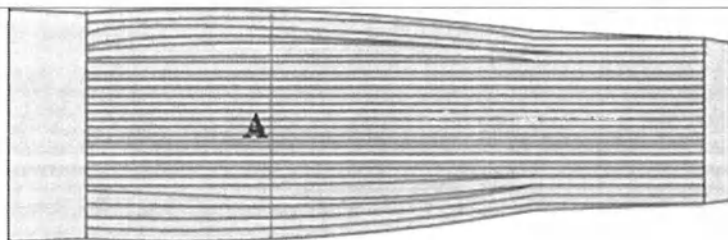


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность голени, см	28-32	32-36	36-40	40-44
Длина А, см	14±0,1	15±0,1	16±0,1	17±0,1
Масса нетто, г	125,4±2	132,3±2	144,1±2	154,2±2
Масса брутто, г	175,4±2	182,3±2	194,1±2	204,2±2

Код 453 Бандаж на колено трикотажный гибкий

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленных суставов. Представляет собой бесшовную трикотажную трапециевидную трубку с силиконовой подушечкой в районе мениска, которая используется в качестве замкнутой эластичной повязки на коленный сустав.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

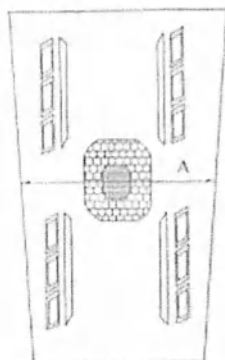

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50


Длина А, см	16±0,5	17±0,5	18±0,5	19±0,5	20±0,5
Масса нетто, г	136,2±2	141,2±2	155,2±2	157,4±2	165±2
Масса брутто, г	185±2	189,8±2	204,4±2	208±2	214±2

Код 455 Бандаж для поддержки ахиллова сухожилия трикотажный

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопных суставов и дополнительной поддержки ахиллова сухожилия. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку, имеющую форму носка без кончика, которая одевается на ступню, как носок. В зоне ахиллова сухожилия внутри повязки размещена силиконовая вставка, которая обеспечивает дополнительную поддержку ахиллова сухожилия.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

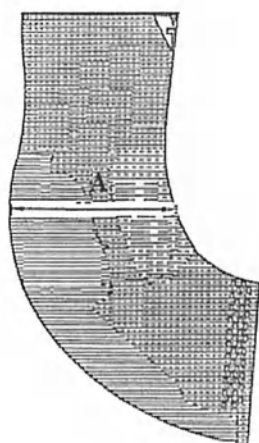


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33
Длина А, см	9±0,5	9,5±0,5	10±0,5	10,5±0,5
Масса нетто, г	119±2	145±2	150±2	207±2
Масса брутто, г	140±2	167±2	170±2	228±2

Код 456 Бандаж для поддержки лодыжки трикотажный

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопных суставов и дополнительной поддержки лодыжки. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку, имеющую форму носка без кончика, которая одевается на ступню, как носок. В зоне лодыжки внутри повязки размещена силиконовая вставка, которая обеспечивает дополнительную поддержку лодыжки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

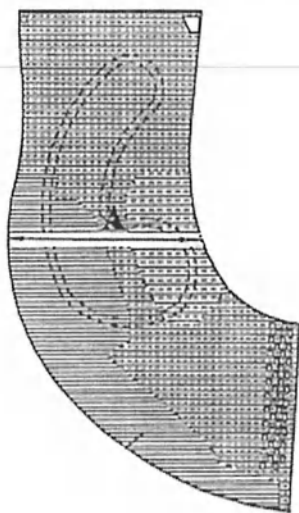


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33
Длина А, см	9±0,5	9,5±0,5	10±0,5	10,5±0,5
Масса нетто, г	64±1	65±1	83±1	97±1
Масса брутто, г	80±1	85±1	103±1	115±1

Код 458 Бандаж для локтевого сустава трикотажный

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний локтевых суставов. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку, которая одевается на локтевой сустав в виде замкнутой эластичной повязки. В зоне локтевого мыщелка размещена силиконовая вставка, которая обеспечивает дополнительную поддержку и защиту локтевому суставу.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности локтя пациента.

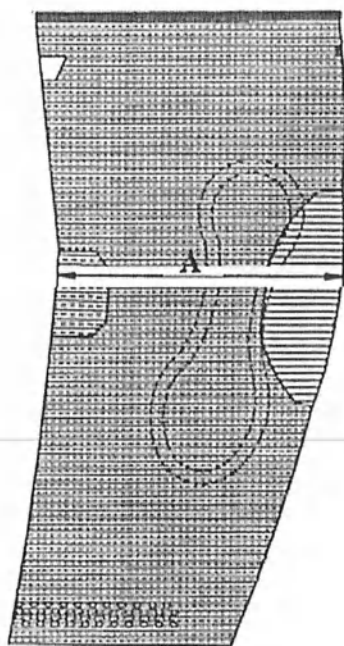


Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность локтя, см	21-24	24-27	27-30	30-33
Длина А, см	10±0,5	11±0,5	12±0,5	13±0,5
Масса нетто, г	69±1	73±1	85±1	89±1
Масса брутто, г	104±1	105±1	117±1	120±1

Код 462 Биндаж для поддержки запястья и пясти

Предназначен для поддержки запястья и пясти, а также для лечения повреждений мягких тканей в этих зонах. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку с отверстием для большого пальца руки, которая одевается на ладонь, как эластичная перчатка без пальцев.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

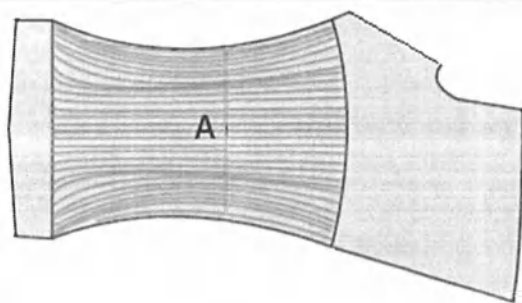

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность запястья, см	12-15	15-18	18-21	21-24
Длина А, см	5±0,1	6±0,1	7±0,1	8±1
Масса нетто, г	23±0,2	25±0,2	27±0,2	29±0,2
Масса брутто, г	39±0,2	41±0,2	43±0,2	45±0,2

Код 474 Бандаж при подошвенном фасците с силиконовой поддержкой пятки

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопных суставов и дополнительной поддержки в области пятки. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку, имеющую форму носка без кончика, которая одевается на ступню, как носок. В зоне пятки внутри повязки размещена мягкая силиконовая вставка, которая обеспечивает дополнительную поддержку пятки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с серым узором, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.




Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Размер ноги	35-37	37-40	40-43	43-46
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33
Длина А, см	10±0,5	12±0,5	14±0,5	16±0,5
Масса нетто, г	59±1	61,6±1	72±1	76±1
Масса брутто, г	75±1	79,5±1	93±1	97±1

Код 475 Бандаж парный при подошвенном фасците с силиконовой поддержкой пятки

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопных суставов и дополнительной поддержки в области пятки. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку, имеющую форму носка без кончика, которая одевается на ступню, как носок. В зоне пятки внутри повязки размещена мягкая силиконовая вставка, которая обеспечивает дополнительную поддержку пятки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется попарно в 1 расцветке: черной с серым узором, и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

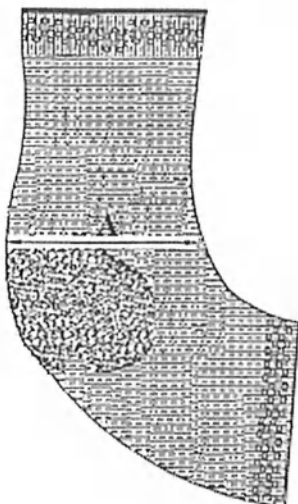


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33
Длина А, см	10±0,5	12±0,5	14±0,5	16±0,5

Масса нетто, г	118±2	123±2	144±2	150±2
Масса брутто, г	134±2	141±2	165±2	185±2

Код 560 Силиконовый мяч для реабилитации кисти

Предназначен для восстановления моторики верхних конечностей, изготовлен из силикона красного, синего и зеленого цвета. Мяч берется в кулак, который потом сжимается и разжимается, при периодическом выполнении данного упражнения мышцы пальцев становятся сильнее.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, представлено в одном универсальном размере и в одном из трех вариантов твердости, отличающихся по цвету: красный- твердый, синий- средней жесткости, зеленый- мягкий.

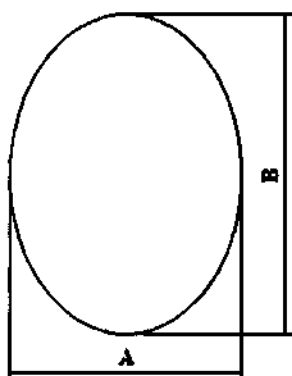


Цвет	Твердость	A, см	B, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Красный	твердый	6±0,25	4,5±0,25	65,2±1	79,2±1
Синий	средний	6±0,25	4,5±0,25	65,2±1	79,2±1
Зеленый	мягкий	6±0,25	4,5±0,25	65,2±1	79,2±1

Код 564 Бандаж плюсневый

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний плюсневых суставов. Представляет собой замкнутую эластичную повязку бежевого цвета с круглым отверстием для большого пальца ноги. В плюсневой зоне подошвы внутри повязки размещена мягкая силиконовая подушечка овальной формы, которая обеспечивает ей дополнительную поддержку.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 бежевой расцветке, и в одном из 2-х размеров: 1-2/S-M, 3-4/L-XL.

Размер подбирается исходя из размера ноги пациента.

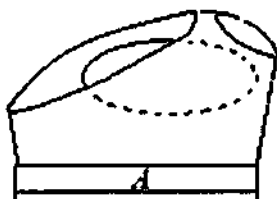


Размер биндажа	1-2/S-M	3-4/L- XL
Размер ноги	34-40	41-46
A, см	7±0,5	8±0,5
Масса нетто, г	32,4±0,5	43,4±0,5
Масса брутто, г	40,2±0,5	51±0,5

Код 565 Биндаж при бурсите большого пальца стопы

Предназначен для лечения консервативного и послеоперационного лечения вальгусных деформаций, вызванных бурситом большого пальца стопы. Представляет собой замкнутую эластичную повязку бежевого цвета с трубчатой нашивкой для большого пальца ноги. В зоне первой плюсневой кости внутри повязки размещена мягкая силиконовая подушечка овальной формы, которая обеспечивает ей дополнительную поддержку.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 бежевой расцветке, и в одном из 2-х размеров: 1-2/S-M, 3-4/L-XL.

Размер подбирается исходя из размера ноги пациента.

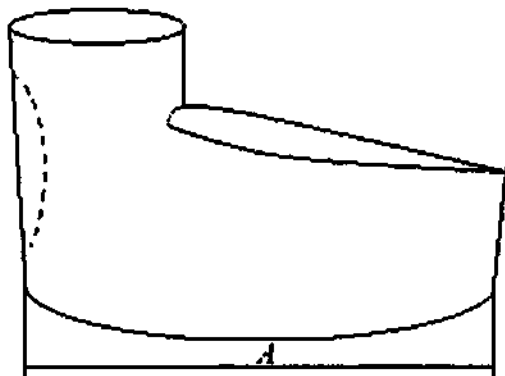

Размер биндажа	1-2/S-M	3-4/L- XL
----------------	---------	-----------


Размер ноги	34-40	41-46
А, см	7±0,5	8±0,5
Масса нетто, г	20,8±0,5	26,6±0,5
Масса брутто, г	29±0,5	34,4±0,5

Код 721 Бандаж для поддержки локтя

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний локтевых суставов, а также для лечения повреждений мягких тканей вокруг локтевого сустава. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку, имеющую дышащую структуру, которая одевается на локтевой сустав в виде замкнутой эластичной повязки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с серым узором, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности локтя пациента.

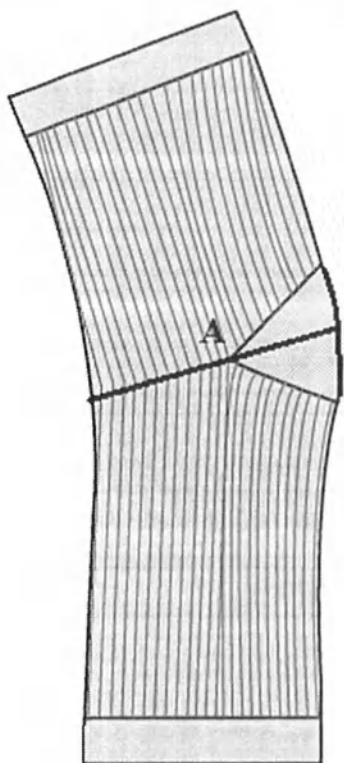

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность локтя, см	21-24	24-27	27-30	30-33


Длина А, см	12±0,1	13,5±0,1	15±0,1	16,5±0,1
Масса нетто, г	15±0,2	19±0,2	22±0,2	26±0,2
Масса брутто, г	36,4±0,2	38,7±0,2	40±0,2	42,4±0,2

Код 722 Бандаж для поддержки запястья и большого пальца руки

Предназначен для поддержки запястья и большого пальца, а также для лечения повреждений мягких тканей в этих зонах. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку с ответвлением для большого пальца руки, имеющую дышащую структуру, которая одевается на ладонь в виде перчатки митенки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с серым узором, и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

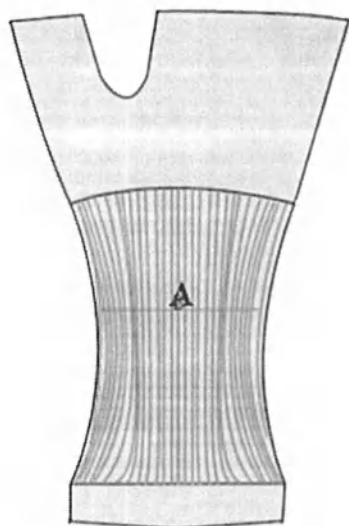


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Окружность запястья, см	13-16	16-19	19-23
Длина А, см	6±0,1	6,5±0,1	7±0,1
Масса нетто, г	12±0,2	14±0,2	16±0,2
Масса брутто, г	28±0,2	30±0,2	32±0,2

Код 723 Бандаж для поддержки икры

Предназначен для поддержки и лечения растяжений икроножной мышцы, а также для лечения повреждений мягких тканей в зоне икры. Представляет собой бесшовную трикотажную трапециевидную трубку, имеющую дышащую структуру, которая одевается на голень в виде замкнутой эластичной повязки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с серым узором, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности икры пациента.

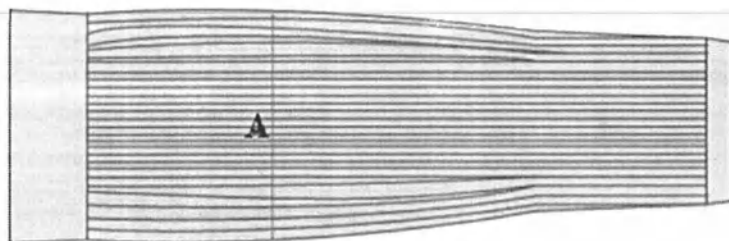


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность голени, см	32-36	36-40	40-44	44-48
Длина А, см	10±0,1	11±0,1	12±0,1	13±0,1
Масса нетто, г	23,6±0,2	25,8±0,2	28,4±0,2	34,4±0,2
Масса брутто, г	41,2±0,2	42,2±0,2	47±0,2	51±0,2

Код 724 Бандаж для поддержки щиколотки

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопных суставов и лечения повреждений мягких тканей в зоне ступни. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку с дышащей структурой, имеющую форму носка без кончика, которая одевается на ступню, как носок.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с серым узором, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

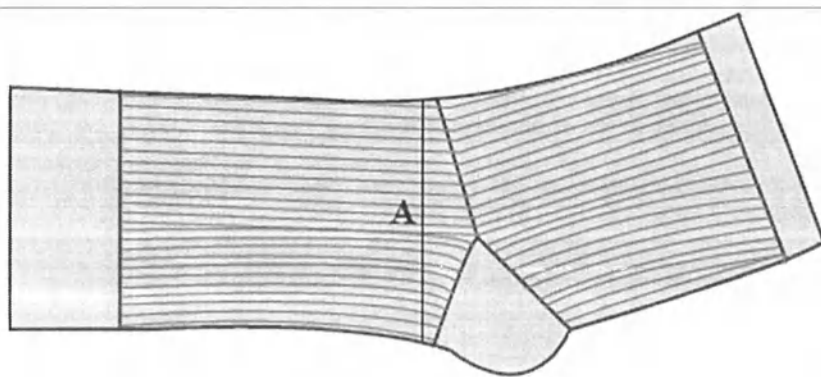


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33
Длина А, см	6±0,1	6,5±0,1	7±0,1	7,5±0,1
Масса нетто, г	15±0,2	17±0,2	18±0,2	20±0,2
Масса брутто, г	30±0,2	33±0,2	34±0,2	35±0,2

Код 725 Бандаж для поддержки колена

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленных суставов и лечения повреждений мягких тканей в зоне колена. Представляет собой бесшовную трапециевидную трикотажную трубку с дышащей структурой, которая одевается на колено, как замкнутая эластичная повязка.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с серым узором, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

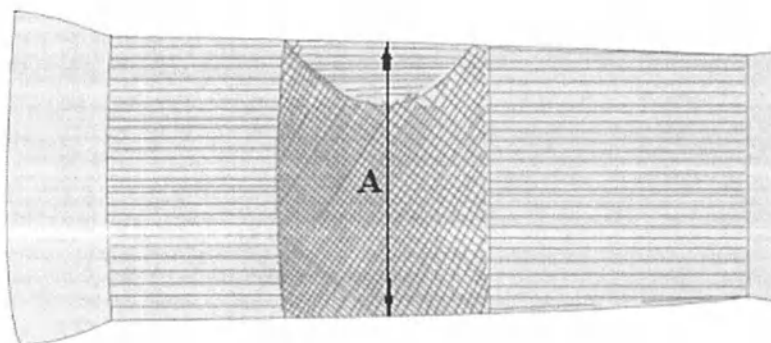


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-43	43-48
Длина А, см	11±0,1	12±0,1	13±0,1	14±0,1
Масса нетто, г	37,8±0,2	39,3±0,2	42,6±0,2	45±0,2
Масса брутто, г	54±0,2	56±0,2	58,8±0,2	61,8±0,2

Код 801 Эластичный бандаж на голеностоп

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопных суставов. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку, имеющую форму носка без кончика, которая одевается на ступню, как носок.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется попарно в одной бежевой расцветке, и в одном из 7-ми размеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

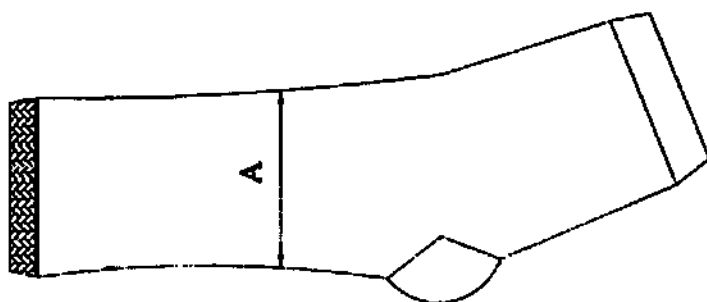


Размер бандажа	1	2	3	4	5	6	7
Окружность щиколотки, см	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30
Длина А, см	7,5±0,1	8±0,1	8,5±0,1	9±0,1	9,5±0,1	10±0,1	10,5±0,1
Масса нетто, г	50,6±0,5	52,2±0,5	54,3±0,5	54,9±0,5	56,6±0,5	57,1±0,5	59,4±0,5
Масса брутто, г	71,8±0,5	73,4±0,5	75,5±0,5	76,1±0,5	77,6±0,5	78,3±0,5	80,4±0,5

Код 802 Эластичный бандаж на голень

Предназначен для поддержки и лечения растяжений икроножной мышцы. Представляет собой бесшовную трикотажную трапециевидную трубку, которая одевается на голень в виде замкнутой эластичной повязки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется попарно в одной бежевой расцветке, и в одном из 7-ми размеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Размер подбирается исходя из длины окружности голени пациента.

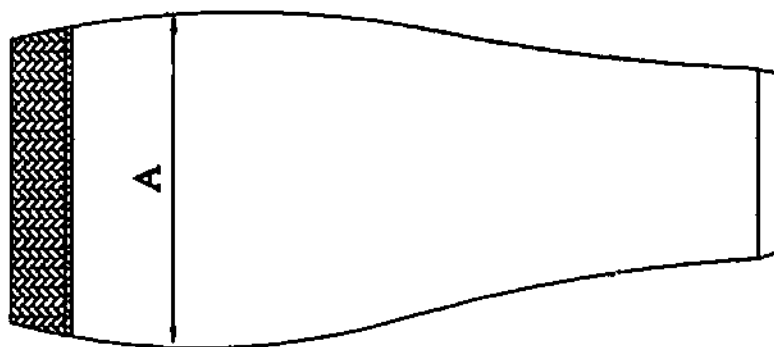


Размер бандажа	1	2	3	4	5	6	7
Окружность голени, см	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42	42-45
Длина А, см	11±0,5	12±0,5	13±0,5	14±0,5	15±0,5	16±0,5	22±0,5
Масса нетто, г	48,5±0,5	49,8±0,5	47,8±0,5	52,2±0,5	59,8±0,5	62,4±0,5	66,2±0,5
Масса брутто, г	70±0,5	71,9±0,5	69,5±0,5	73,2±0,5	80,8±0,5	83,4±0,5	87±0,5

Код 803 Эластичный бандаж на колено

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой бесшовную трикотажную трапециевидную трубку, которая одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется попарно в одной бежевой расцветке, и в одном из 7-ми размеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

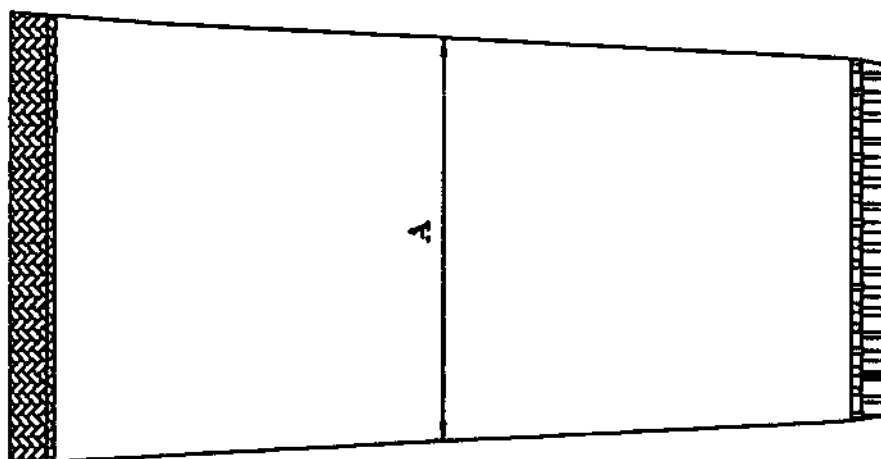


Размер бандажа	1	2	3	4	5	6	7
Окружность колена, см	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-50
Длина А, см	13±0,5	13,5±0,5	14±0,5	14±5	15±0,5	15,5±0,5	16±0,5
Масса нетто, г	66±0,5	67,7±0,5	69,3±0,5	70,4±0,5	72,3±0,5	74,2±0,5	75±0,5
Масса брутто, г	87±0,5	88,7±0,5	90,3±0,5	91,5±0,5	93,3±0,5	95,2±0,5	96,1±0,5

Код 804 Бандаж на колено

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой бесшовную трапециевидную трубку, выполненную из плотной согревающей трикотажной ткани, которая одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной белой расцветке, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

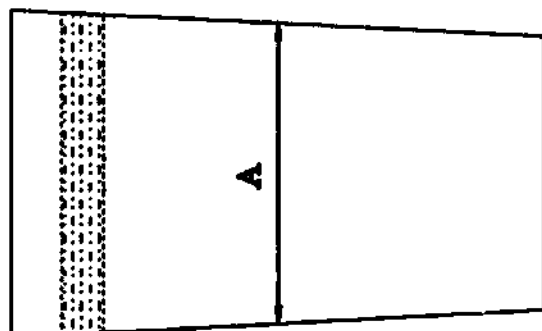


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	28-32	32-36	36-40	40-44	44-49
Длина А, см	14,5±0,5	15±0,5	15,5±0,5	16±0,5	16,5±0,5
Масса нетто, г	52,4±0,5	55±0,5	57,4±0,5	60,4±0,5	65,4±0,5
Масса брутто, г	86,2±,5	88,8±,5	90±0,5	94±0,5	97,4±0,5

Код 805 Бандаж на колено мягкий

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой бесшовную трапециевидную трубку, выполненную из плотной согревающей трикотажной ткани, которая одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной светло-бежевой расцветке, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

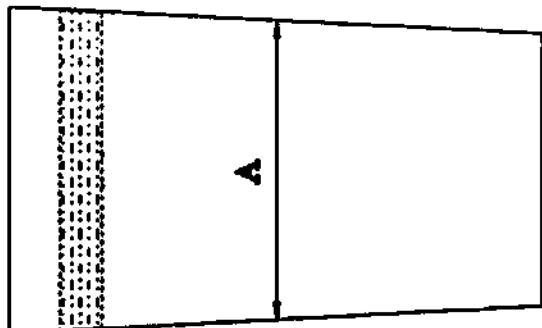


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	28-32	32-36	36-40	40-44	44-49
Длина А, см	14,5±0,5	15±0,5	15,5±0,5	16±0,5	16,5±0,5
Масса нетто, г	51,8±0,5	58,4±,5	64,8±0,5	67±0,5	75,4±0,5
Масса брутто, г	90,1±0,5	97±0,5	104,2±0,5	106,4±0,5	109,3±0,5

Код 806 Бандаж на колено длинный

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой бесшовную трапециевидную трубку, выполненную из плотной согревающей трикотажной ткани, которая одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной белой расцветке, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

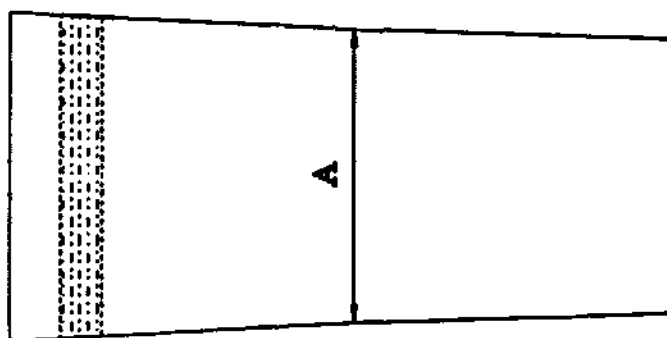


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	28-32	32-36	36-40	40-44	44-49
Длина А, см	14,5±0,5	15±0,5	15,5±0,5	16±0,5	16,5±0,5
Масса нетто, г	71,4±0,5	72,6±0,5	73,4±0,5	74±0,5	82±0,5
Масса брутто, г	104,4±0,5	105,2±0,5	106,6±0,5	107,2±0,5	115,6±0,5

Код 820 Бандаж на колено закрытый

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой трапециевидную трубку, выполненную из плотной согревающей неопреновой ткани с хлопковой подкладкой, которая одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

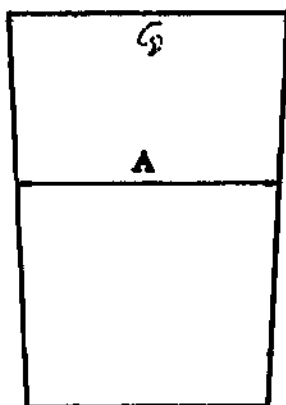


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50
Длина А, см	16±0,5	17±0,5	18±0,5	19±0,5	20±0,5
Масса нетто, г	143,6±2	149,4±2	164,4±2	193,4±2	194,2±2
Масса брутто, г	209±2	215±2	225,2±2	254,4±2	261±2

Код 822 Бандаж на колено с поддержкой надколенной чашечки

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой трапециевидную трубку с круглым вырезом в районе надколенной чашечки, выполненную из плотной согревающей неопреновой ткани с хлопковой подкладкой, которая одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

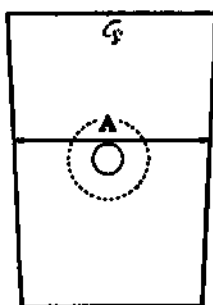


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50
Длина А, см	16±0,5	17±0,5	18±0,5	19±0,5	20±0,5
Масса нетто, г	142,4±2	155,6±2	168,9±2	180,6±2	224,2±2
Масса брутто, г	202,6±2	216,2±2	230,5±2	235,6±2	283,6±2

Код 849 Бандаж для локтевого сустава с силиконом

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний локтевых суставов. Представляет собой трубку из плотной согревающей неопреновой ткани, которая одевается на локтевой сустав в виде замкнутой эластичной повязки. С обеих сторон внутри бандажа имеются силиконовые вставки, которые обеспечивают дополнительную компрессию бандажа.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности локтя пациента.

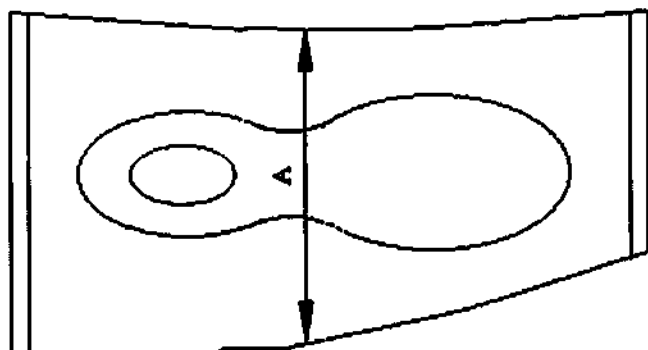


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность локтя, см	21-24	24-27	27-30	30-33
Длина А, см	12±0,5	14±0,5	15±0,5	17±0,5
Масса нетто, г	96,8±1	103,4±1	107,2±1	112,6±1
Масса брутто, г	148,6±1	152,8±1	159,3±	162,1±1

Код 953 Бандаж для поддержки запястья и пальцев руки

Предназначен для поддержки запястья и пальцев руки. Представляет собой пару эластичных перчаток с открытыми кончиками пальцев, выполненную из эластичного трикотажного материала.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется попарно в одной бежевой расцветке и в одном из 6-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL, 6/ XXXL.

Размер подбирается исходя из длин окружности ладони и запястья пациента.

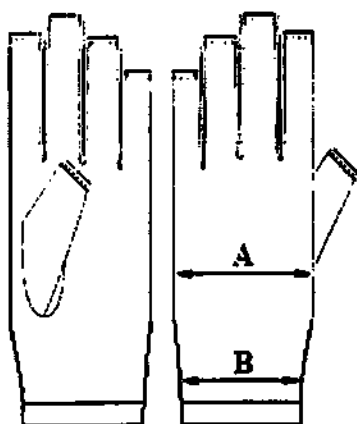


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL	6/ XXXL
Окружность запястья, см	14,5-16	16-17,5	17,5-19	19-20,5	20,5-22,5	22,5-24,5
Окружность ладони, см	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-28
Длина А, см	7±0,1	7,5±0,1	8±0,1	8,5±0,1	9±0,1	9,5±0,1
Длина В, см	6±0,1	6,5±0,1	7±0,1	7,5±0,1	8±0,1	8,5±0,1
Масса нетто, г	28,6±0,5	30,4±0,5	30,4±0,5	37,8±0,5	45,2±0,5	52,6±0,5
Масса брутто, г	49,8±0,5	51,8±0,5	51,2±0,5	58,6±0,5	66±0,5	73,4±0,5

Код 975 Носки эластичные

Предназначены для легкой поддержки и лечения повреждений мягких тканей в районе ступни, щиколотки и нижней трети икры. Представляют собой носки из эластичной трикотажной ткани. Поставляются попарно.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, представлено в 2-х цветах- бежевом или черном, и в одном из 2-х размеров: 36-40/S-M, 41-45/L-XL.

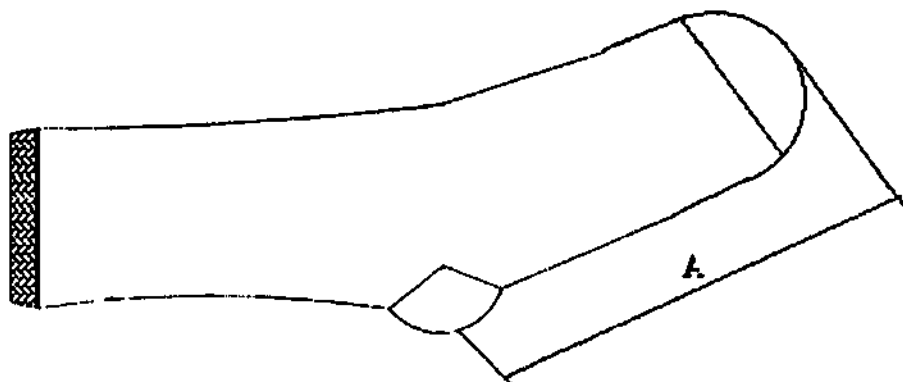


Размер носков	S-M	L- XL
Размер ноги	36-40	41-45
Длина А, см	16±0,5	17±0,5
Масса нетто, г	33±0,2	38±0,2
Масса брутто, г	49,3±0,2	53,5±0,2

Код 977 Носки по щиколотку эластичные

Предназначены для легкой поддержки и лечения повреждений мягких тканей в районе ступни и щиколотки. Представляют собой носки из эластичной трикотажной ткани высотой по щиколотку. Поставляются попарно.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, представлено в 2-х цветах- бежевом или черном, и в одном из 2-х размеров: 36-40/S-M, 41-45/L-XL.

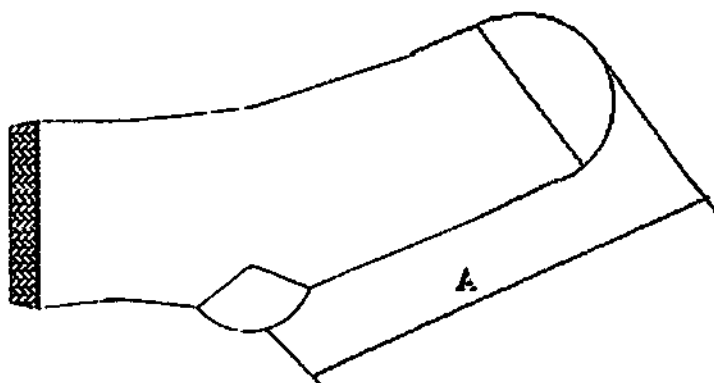


Размер носков	S-M	L- XL
Размер ноги	36-40	41-45

Длина А, см	16±0,5	17±0,5
Масса нетто, г	30,6±0,2	31,4±0,2
Масса брутто, г	45,8±0,2	46,9±0,2

Код 979 Носки высокие эластичные

Предназначены для легкой поддержки и лечения повреждений мягких тканей в районе ступни, щиколотки и нижней половины икры. Представляют собой носки из эластичной трикотажной ткани высотой до половины икры. Поставляются попарно.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, представлено в 2-х цветах бежевом или черном, и в одном из 2-х размеров: 36-40/S-M, 41-45/L-XL.

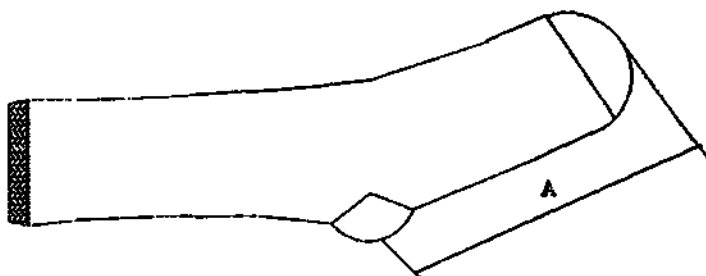

Размер носков	S-M	L- XL
Размер ноги	36-40	41-45
Длина А, см	16±0,5	17±0,5
Масса нетто, г	28,6±0,2	32±0,2
Масса брутто, г	43,8±0,2	47,2±0,2


Группа II. Бандаж регулируемый представлена следующими вариантами исполнения:

Код 119 Стремена Павлика

Изделие предназначено для лечения дисплазии (вывиха) тазобедренного сустава у детей с рождения, представляет собой единую систему из бандажей и ремешков: грудную часть с регулируемыми отстегивающимися лямками и отстегивающимися разводящими ремнями с голеностопными бандажами.

Действие стремян Павлика заключается в надёжной фиксации тазобедренного сустава для предотвращения его вывиха, при возможности свободного вращения бедра в безопасной зоне.

Изделие предназначено для детей с рождения, представлено в одном бежевом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

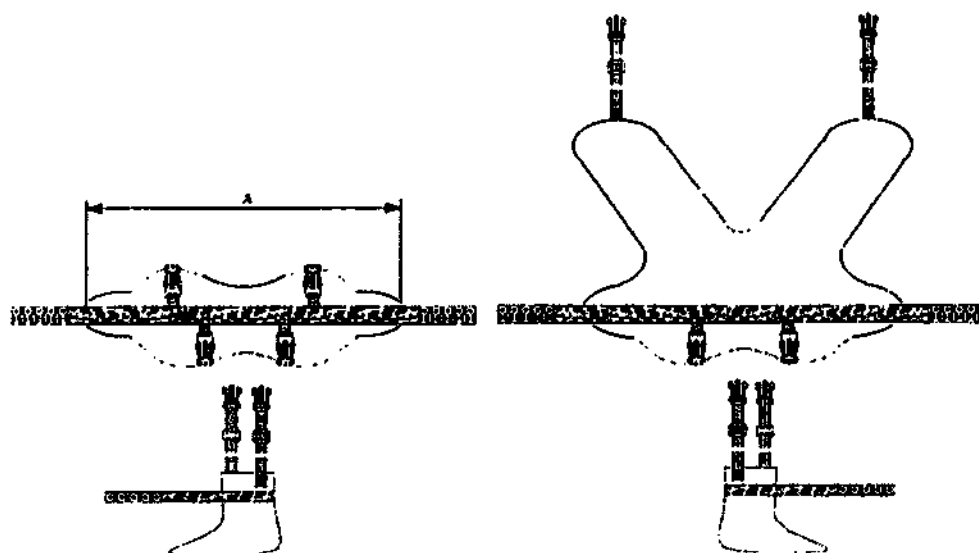


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Окружность талии ребенка, см	25-35	36-46	47-57
Длина А, см	21±1	25±1	29±1
Масса нетто, г	92±1	97,8±1	107±1
Масса брутто г	139±1	145±1	150±1

Код 160 Бандаж эпикондилитный ТХ

Предназначен для профилактики и лечения эпикондилита локтевого сустава. Представляет собой тканевый ремень, размер которого регулируется с помощью застёжки-липучки, с внутренней стороны которого имеется мягкая силиконовая вкладка, размещающаяся в зоне крепления сухожилий мышц к выступам плечевой кости.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной расцветке-бежевой с черным, и в одном универсальном размере.

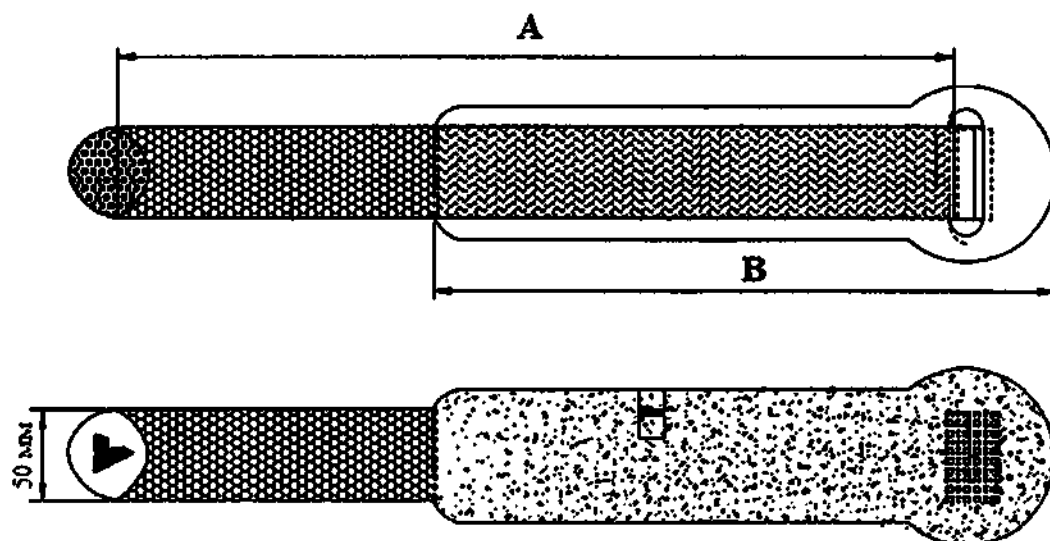

A, мм	B, мм	Масса нетто, г	Масса брутто, г
47±1	23±0,5	51,5±0,5	72,5±0,5


Код 163 Бандаж на колено с гибкими спицами ТХ

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой трапециевидную трубку с круглым вырезом в районе надколенной чашечки, выполненную из плотной ткани, выше и ниже выреза к трубке пришиты фиксирующие ремни с застежками-липучками, слева и справа от выреза между основной тканью и подкладкой вшиты по 2 гибкие металлические спицы в виде спиралей.

Бандаж одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки, которая дополнительно фиксируется ремнями на липучках.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной расцветке-бежевой с черным, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

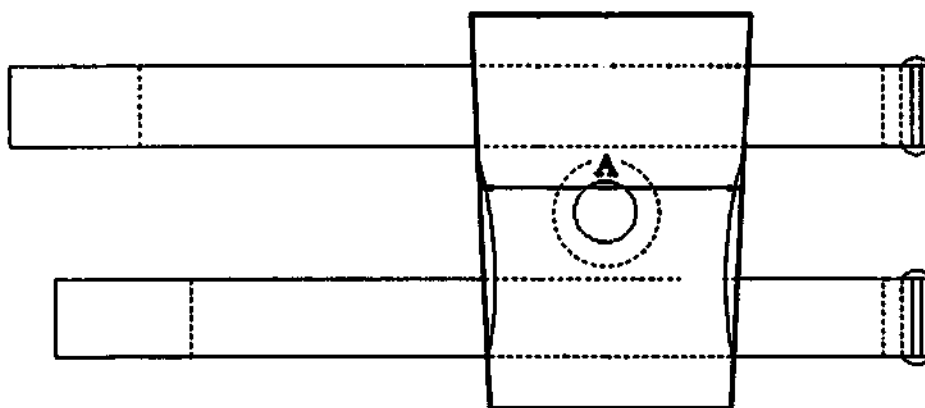


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50
Длина А, см	16±0,5	17±0,5	18±0,5	19±0,5	20±0,5
Масса нетто, г	250,8±3	257,4±3	267,8±3	275,7±3	281,9±3
Масса брутто, г	321±3	329,2±3	336,8±3	348,1±3	359

Код 164 Бандаж на лодыжку с опорой ТХ

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопных суставов и дополнительной поддержки лодыжки. Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую форму носка без кончика со шнуровкой, которая одевается на ступню, как носок. В зоне лодыжки между основной тканью и подкладкой размещена силиконовая вставка, которая обеспечивает дополнительную поддержку лодыжки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- бежевой с черным, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

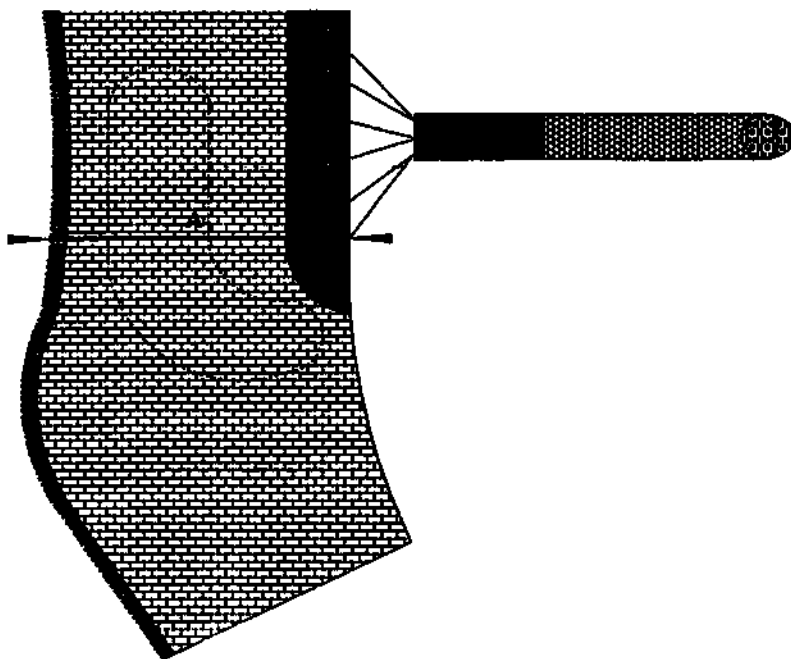

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33
Длина А, см	10±0,5	11±0,5	12±0,5	13±0,5
Масса нетто, г	130±2	134±2	138±2	141±2
Масса брутто, г	172±2	176±2	182±2	184±2


Код 165 Биндаж-шина на запястье ТХ

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава. Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую прорезь для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и ладони с помощью шнуровки и ремня. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль внутренней поверхности руки вшита металлическая шина, способствующая фиксации положения лучезапястного сустава в линейном положении.³⁴⁰

Изделие для правой руки зеркально симметрично изделию для левой руки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- бежевой с черным, и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

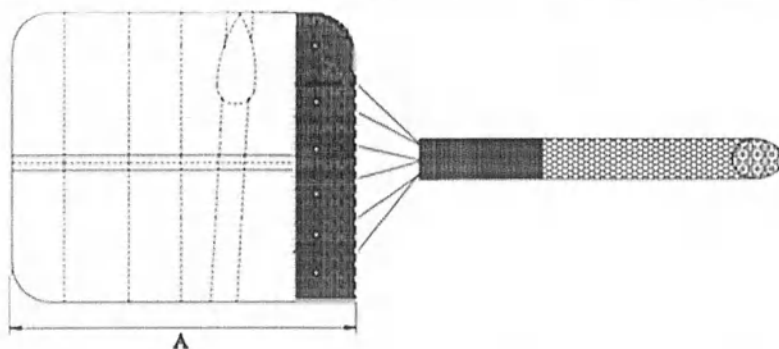


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Окружность запястья, см	13-16	16-19	19-22
Длина А, см	16±0,5	19±0,5	22±0,5
Масса нетто, г	103±1	112,4±1	116,8±1
Масса брутто, г	135,4±1	145,2±1	148,6±1

Код 188 Отводящий корсет

Изделие предназначено для лечения дисплазии (вывиха) тазобедренного сустава у детей с рождения, представляет собой текстильный ремень с пряжкой, фиксирующийся на талии, к ремню пришта П-образная полиэтиленовая пластина, нижние детали которой обхватывают левое и правое бедро ребенка для фиксации ног в отведенном положении. Ширина отведения регулируется с помощью металлической отводящей пластины.

Действие корсета заключается в фиксации тазобедренного сустава для предотвращения его вывиха, при возможности свободного вращения бедра в безопасной плоскости.

Изделие предназначено для детей с рождения, представлено в одном бежевом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

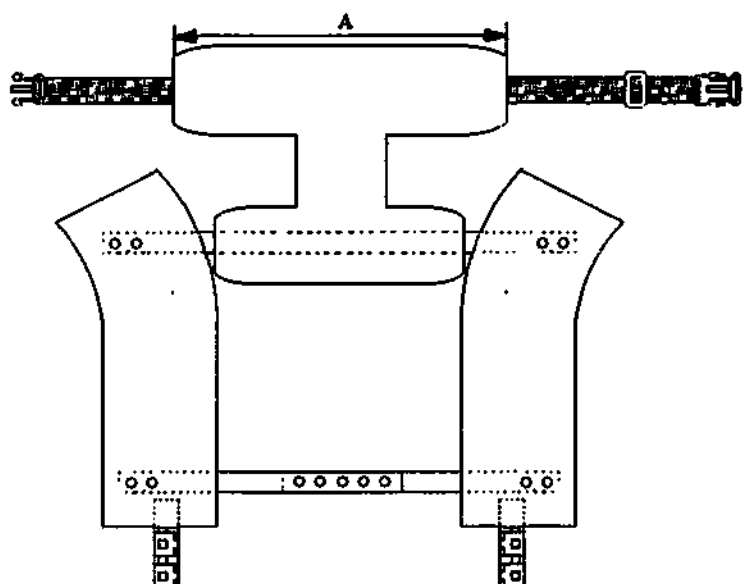

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Окружность талии ребенка, см	25-35	36-46	47-57
Длина А, см	12±1	17±1	22±1
Масса нетто, г	201,6±3	240,5±3	302,4±3
Масса брутто, г	229,4±3	270,6±3	331,4±3


Код 300 Бандаж-косынка для руки

Предназначен для фиксации руки в согнутом на 90° положении, разгружает суставы всей верхней конечности, уменьшает болевые ощущения и отечность руки.

Используется при растяжениях мышц и воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности, реабилитации после: травм, операций на плечевом суставе, лопатке, ключице, а также при гипсовой иммобилизации плеча и предплечья.

Представляет собой карман из нетканого материала, в котором предплечье располагается целиком, к карману с обоих краев прикреплен регулируемый ремень-подхват на пряжке, который перекидывается через шею.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в двух цветах: синем или черном, и в одном из 2-х размеров: 1/S или 3/L.

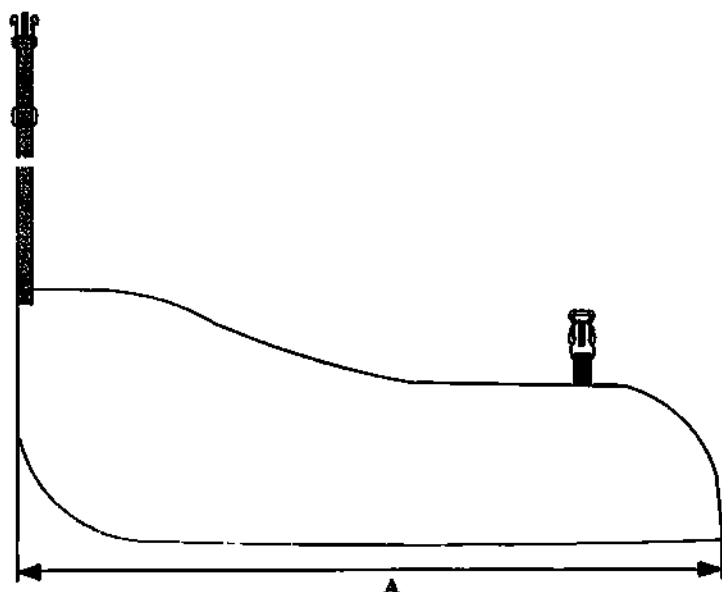

Размер бандажа	1/S	3/L
Расстояние от кончика среднего пальца до вершины локтя, см	36-40	45-50
Длина А, см	40±1	50±1
Масса нетто, г	420±5	468±5
Масса брутто, г	503,6±5	554,4±5


Код 301 Бандаж-шина на запястье

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава. Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую прорезь для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и ладони с помощью застежки-липучки. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль внутренней поверхности руки вшита металлическая шина, способствующая фиксации положения лучезапястного сустава в линейном положении.

Бандаж для правой руки зеркально симметричен бандажу для левой руки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- бежевой с белым, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

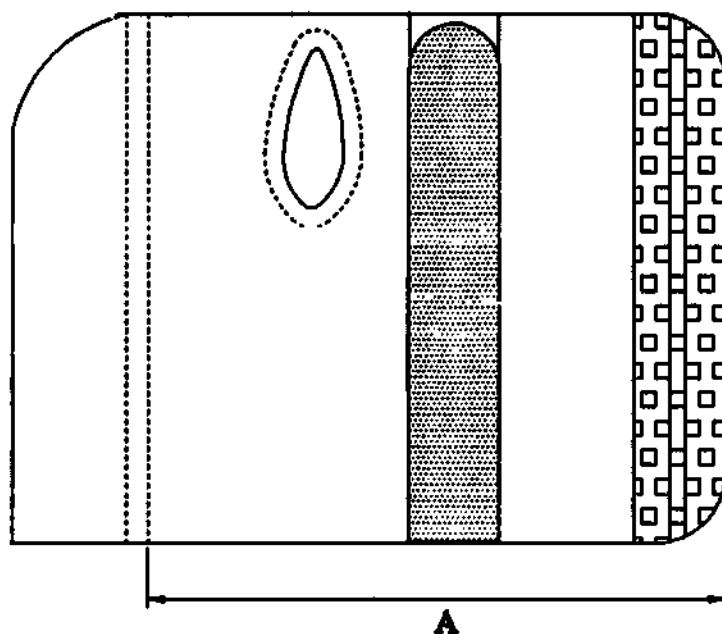

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность запястья см	13-15	15-17	17-19	19-21	21-24
Длина А, см	18±1	20±1	22±1	24±1	26±1
Масса нетто, г	75,2±1	76,8±1	79,6±1	82,6±1	87,8±1
Масса брутто, г	106,6±1	107,5±1	111,4±1	113,2±1	116±1


Код 302 Биндаж-косынка для руки

Предназначен для фиксации руки в согнутом на 90° положении, разгружает суставы всей верхней конечности, уменьшает болевые ощущения и отечность руки.

Используется при растяжениях мышц и воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности, реабилитации после травм, операций на: плечевом суставе, лопатке, ключице, а также при гипсовой иммобилизации плеча и предплечья.

Представляет собой карман из хлопковой ткани, в котором предплечье располагается целиком, к карману с обоих краев прикреплен регулируемый ремень-подхват с пряжкой, который перекидывается через шею.

Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, модели для взрослых поставляются в двух цветах: синем или белом, для детей- в одной расцветке- белой с синим узором, и в одном из 4-х размеров: 0/XS (детский), 1/S, 2/M, 3/L.

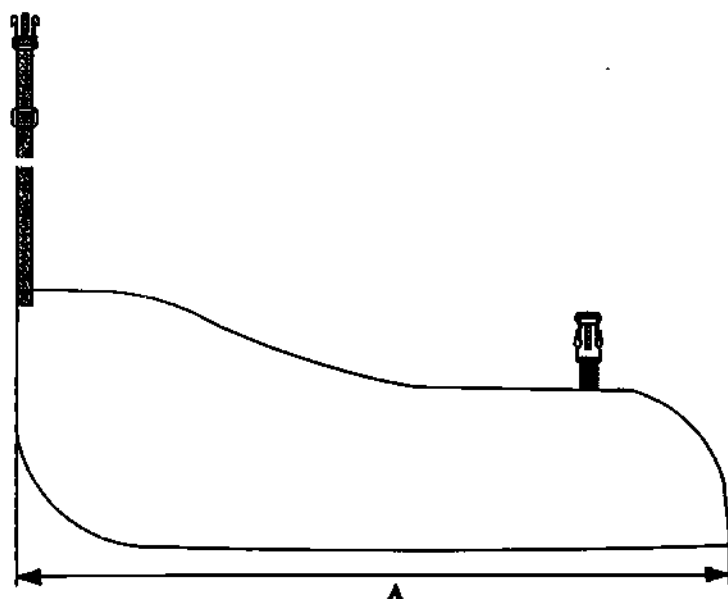

Размер биндажа	0/XS	1/S	2/M	3/L
Расстояние от кончика среднего пальца до вершины локтя, см	22-32	36-40	40-45	45-50
Длина А, см	33±1	38±1	43±1	48±1
Масса нетто, г	42±0,5	65,8±0,5	77,6±0,5	86,4±0,5
Масса брутто, г	67,2±0,5	90±0,5	105,2±0,5	114,4±0,5

Код 302К Биндаж-косынка для руки с ремнем


Предназначен для фиксации руки в согнутом на 90° положении, разгружает суставы всей верхней конечности, уменьшает болевые ощущения и отечность руки.

Используется при растяжениях мышц и воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности, реабилитации после травм, операций на: плечевом суставе, лопатке, ключице, а также при гипсовой иммобилизации плеча и предплечья.

Представляет собой карман из хлопковой ткани, в котором предплечье располагается целиком, к карману с обоих краев прикреплено два регулируемых ремня на пряжках, один из которых перекидывается через шею, а другой фиксируется вокруг тела.

Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, модели для взрослых поставляются в двух цветах: синем или белом, для детей - в одной расцветке - белой с синим узором, и

в одном из 4-х размеров: 0/XS (детский), 1/S, 2/M, 3/L.

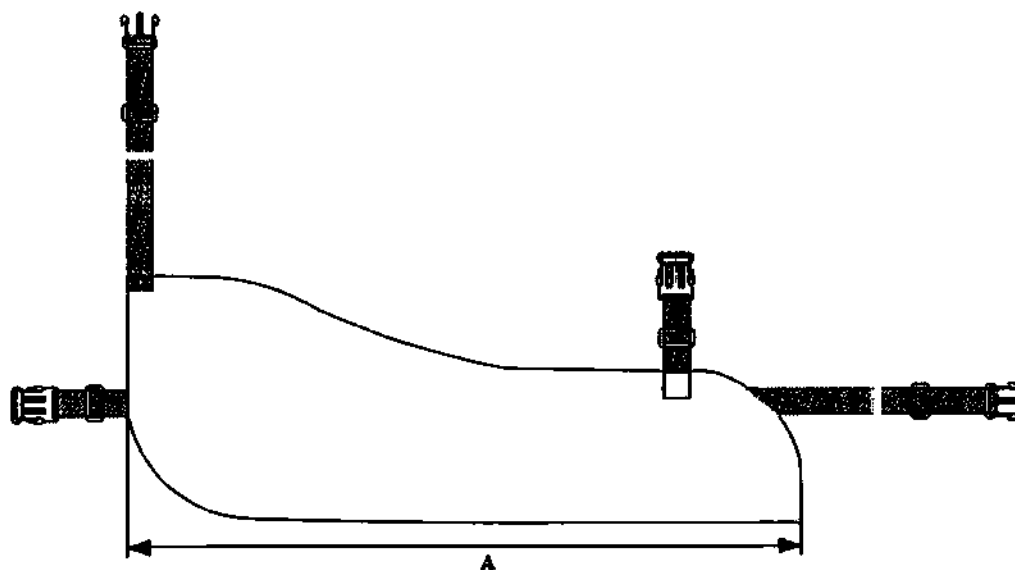

Размер биндажа	0/XS	1/S	2/M	3/L
Расстояние от кончика среднего пальца до вершины локтя, см	22-32	36-40	40-45	45-50
Длина А, см	33±1	40±1	45±1	50±1
Масса нетто, г	67,2±0,5	101,2±0,5	111,6±0,5	117±0,5
Масса брутто, г	82,4±0,5	126,6±0,5	141,6±0,5	146,6±0,5


Код 303 Биндаж-косынка для руки губчатый

Предназначен для фиксации руки в согнутом на 90° положении, разгружает суставы всей верхней конечности. уменьшает болевые ощущения и отечность руки.

Используется при растяжениях мышц и воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности, реабилитации после травм, операций на: плечевом суставе, лопатке, ключице, а также при гипсовой иммобилизации плеча и предплечья.

Представляет собой карман из мягкого синтетического трехслойного (средний слой-поролон) материала, в котором предплечье располагается целиком, к карману с обоих краев прикреплен регулируемый застежками-липучками ремень-подхват, который перекидывается через шею.

Изделие предназначено для лиц старше 3-х лет, поставляется в одном бежевом цвете и в одном из 2-х размеров: универсальном детском или универсальном взрослом.

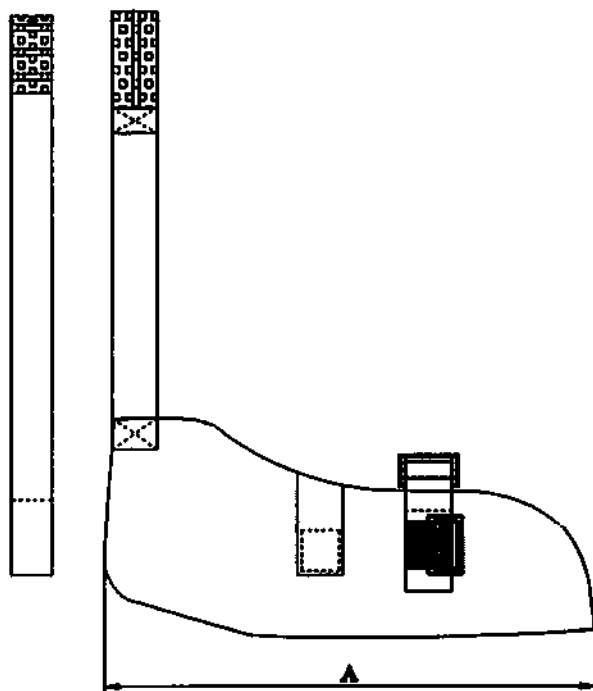


Размер	Длина А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Универсальный взрослый	48±1	164,4±1	192±1
Универсальный детский	30±1	107,8±1	125±1

Код 304 Бандаж, поддерживающий плечевой сустав (Вельпо)

Предназначен для фиксации руки в согнутом положении под углом 90°. Используется при растяжении мышц плечевого пояса, воспалительных заболеваниях плечевого сустава и при переломе ключицы. Представляет собой систему из двух бандажей с застежками-липучками, изготовленных из мягкого синтетического трехслойного (средний слой-поролон) материала, первый бандаж поддерживает предплечье, как бандаж-косынка, второй бандаж представляет из себя пояс на липучке, который обхватывает тело поверх зафиксированного предплечья., обеспечивая дополнительную фиксацию.

Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, поставляется в двух цветах: бежевом или черном и в одном из двух размеров: универсальном детском или универсальном взрослом.

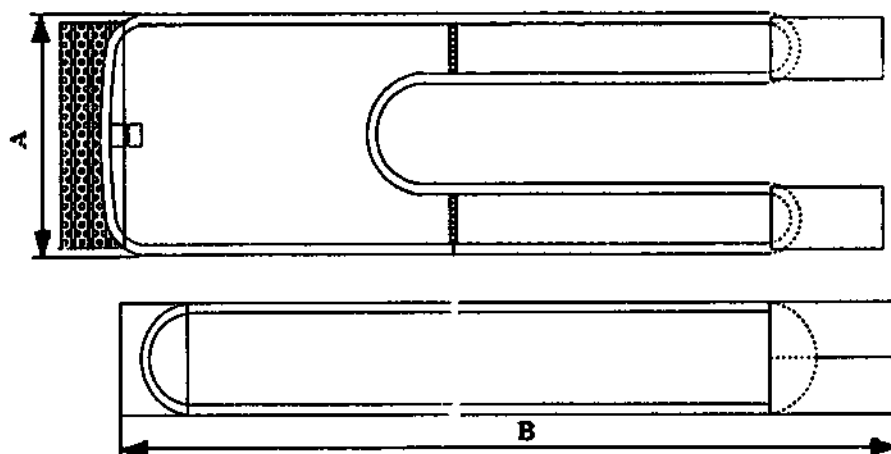


Размер	А, см	В, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Универсальный детский	25±1	112±2	186,6±3	276,4±3
Универсальный взрослый	30±1	140±2	275±3	368±3

Код 305 Бандаж-шина большого пальца руки

Предназначен для поддержки и фиксации большого пальца руки. Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую прорезь для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и большого пальца с помощью застежек-липучек. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль большого пальца вшита металлическая шина, способствующая фиксации положения большого пальца руки в линейном положении. Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной бежевой расцветке и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

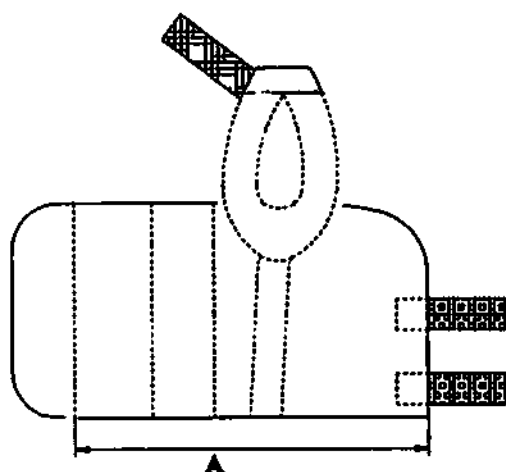

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность запястья, см	13-15	15-17	17-19	19-22
Длина А, см	15±0,5	17±0,5	19±0,5	22±0,5
Масса нетто, г	40,6±0,5	41±0,5	42,3±0,5	45,7±0,5
Масса брутто, г	74,4±0,5	78,8±0,5	81,6±0,5	83,7±0,5

Код 306 Бандаж-шина с поддержкой большого пальца руки


Предназначен для поддержки и мягкой фиксации большого пальца руки.

Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую прорезь для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и большого пальца с помощью застежек-липучек.

Бандаж для правой руки зеркально симметричен бандажу для левой руки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной бежевой расцветке и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

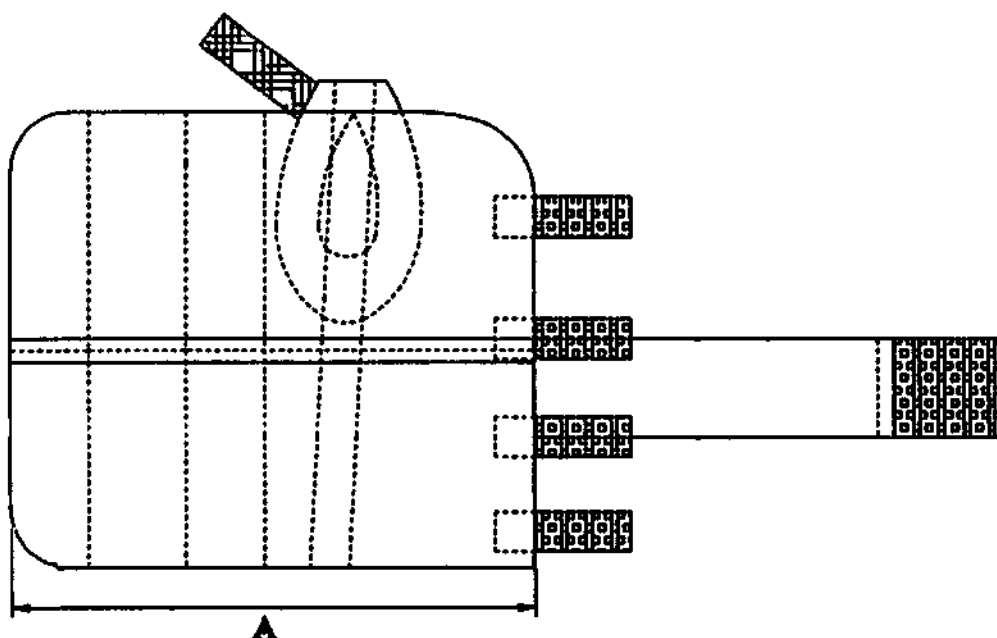

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность запястья, см	13-15	15-17	17-19	19-21	21-24

Длина А, см	19,5±0,5	20±0,5	20,5±0,5	21±0,5	22±0,5
Масса нетто, г	96,2±1	98±1	106,6±1	115,3±1	119±1
Масса брутто, г	130,2±1	133,2±1	141,6±1	148,4±1	153,6±1


Код 307 Бандаж-шина на запястье эластичный

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава. Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую прорезь для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и ладони с помощью застежек-липучек и эластичного ремня на застежке-липучке. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль внутренней поверхности руки вшита металлическая шина, способствующая фиксации положения лучезапястного сустава в линейном положении.

Бандаж для правой руки зеркально симметричен бандажу для левой руки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной бежевой расцветке и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

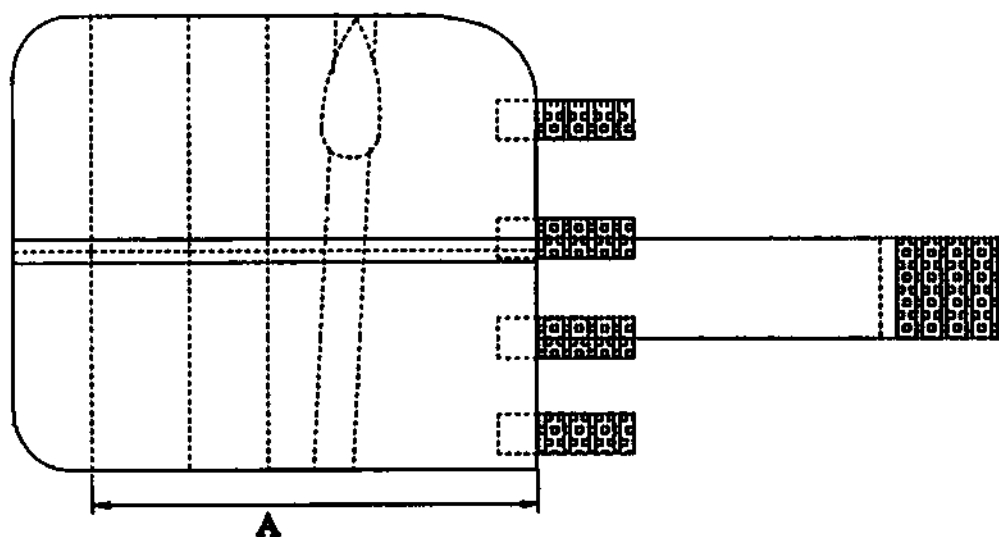


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность запястья, см	13-15	15-17	17-19	19-21	21-24
Длина А, см	15±0,5	17±0,5	19±0,5	21±0,5	24±0,5

Масса нетто, г	76±1	79,8±1	86,2±1	88,2±1	94,4±1
Масса брутто, г	110,4±1	113,4±1	120,2±1	122,2±1	128,4±1

Код 308 Бандаж-шина на запястье ночной

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава и ладони. Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую две прорези для большого пальца правой и левой руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и нижней трети пальцев с помощью застежек-липучек. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль внутренней поверхности руки вшита металлическая шина, способствующая фиксации положения лучезапястного сустава в линейном положении.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной бежевой расцветке и в одном универсальном размере.

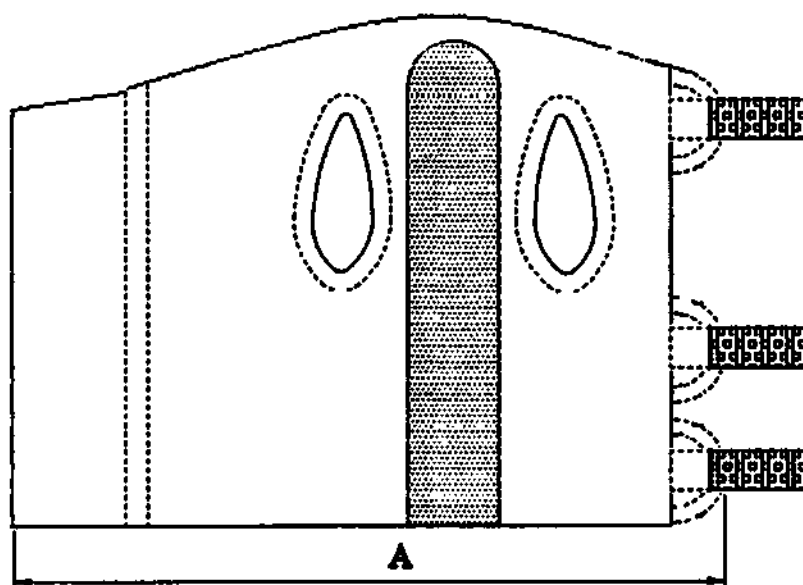

A, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
29±1	107,8±1	125,6±1


Код 309 Бандаж эластичный на запястье

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава. Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую прорезь для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и ладони с помощью шнуровки и эластичного ремня. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль внутренней поверхности руки вшита металлическая шина,

способствующая фиксации положения лучезапястного сустава в линейном положении.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной черной расцветке и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

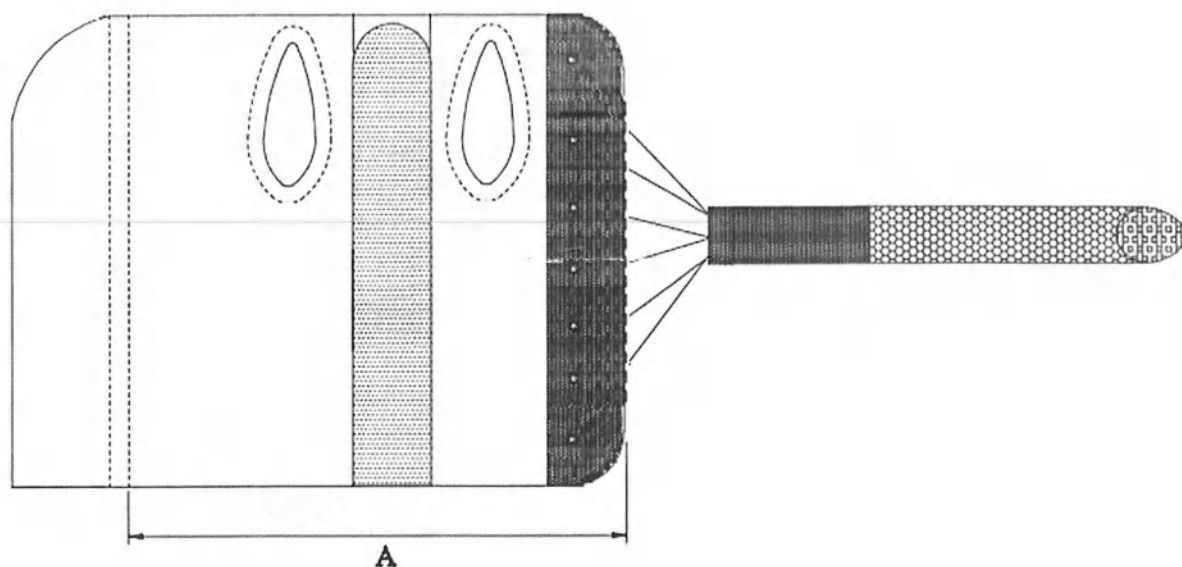

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Окружность запястья, см	13-16	16-19	19-22
Длина А, см	16±0,5	19±0,5	22±0,5
Масса нетто, г	83,2±1	89±1	90,4±1
Масса брутто, г	120,8±1	122,2±1	123,6±1


Код 312 Биндаж-косынка для руки из неопрена

Предназначен для фиксации руки в согнутом на 90° положении, разгружает суставы всей верхней конечности, уменьшает болевые ощущения и отечность руки.

Используется при растяжениях мышц и воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности, реабилитации после травм, операций на: плечевом суставе, лопатке, ключице, а также при гипсовой иммобилизации плеча и предплечья.

Представляет собой карман из мягкого неопрена, в котором предплечье располагается целиком, к карману с обоих краев прикреплен регулируемый застежками-липучками ремень-подхват, который перекидывается через шею.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном универсальном размере.

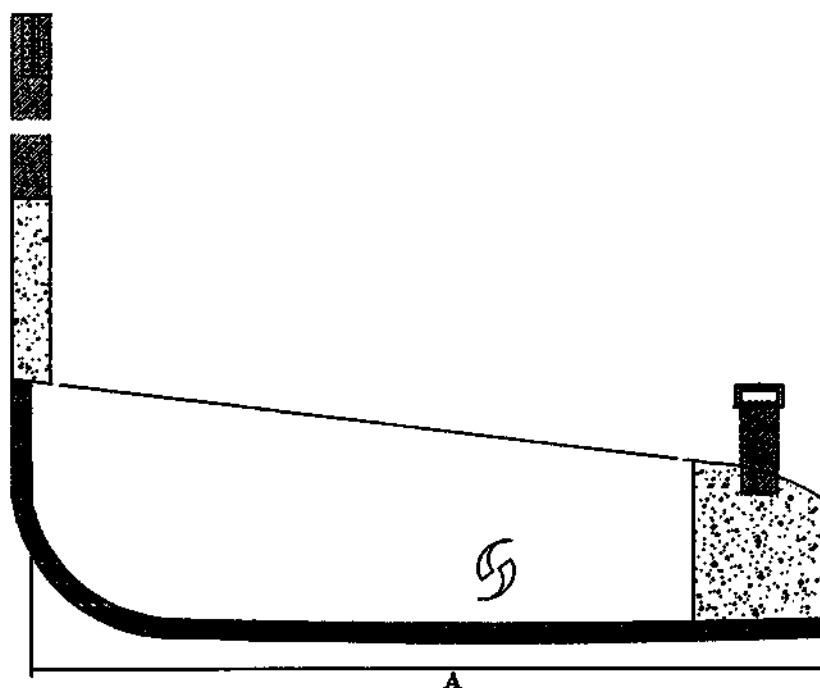


A, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
42±1	189±2	228,6±2

Код 313 Бандаж-косынка для руки активный

Предназначен для фиксации руки в согнутом положении на 90° и под углом к телу от 30° до 45°, угол к телу увеличивается при увеличении объема воздуха, закаченного в специальный баллон, зафиксированный между телом и косынкой.

Бандаж разгружает суставы всей верхней конечности, уменьшает болевые ощущения и отечность руки. Используется при растяжениях мышц и воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности, реабилитации после травм, операций на: плечевом суставе, лопатке, ключице, а также при гипсовой иммобилизации плеча и предплечья. Представляет собой карман из мягкого синтетического трехслойного (средний слой-поролон) материала, в котором предплечье располагается целиком, к карману с обоих краев прикреплен регулируемый застежками-липучками ремень-подхват, который перекидывается через шею. Между карманом и телом располагается резиновый баллон, сверху покрытый тем же материалом, к карману баллон крепится с помощью застежки-липучки, а к телу с помощью опоясывающего ремня на застежке липучке.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном бежевом цвете и в одном универсальном размере.

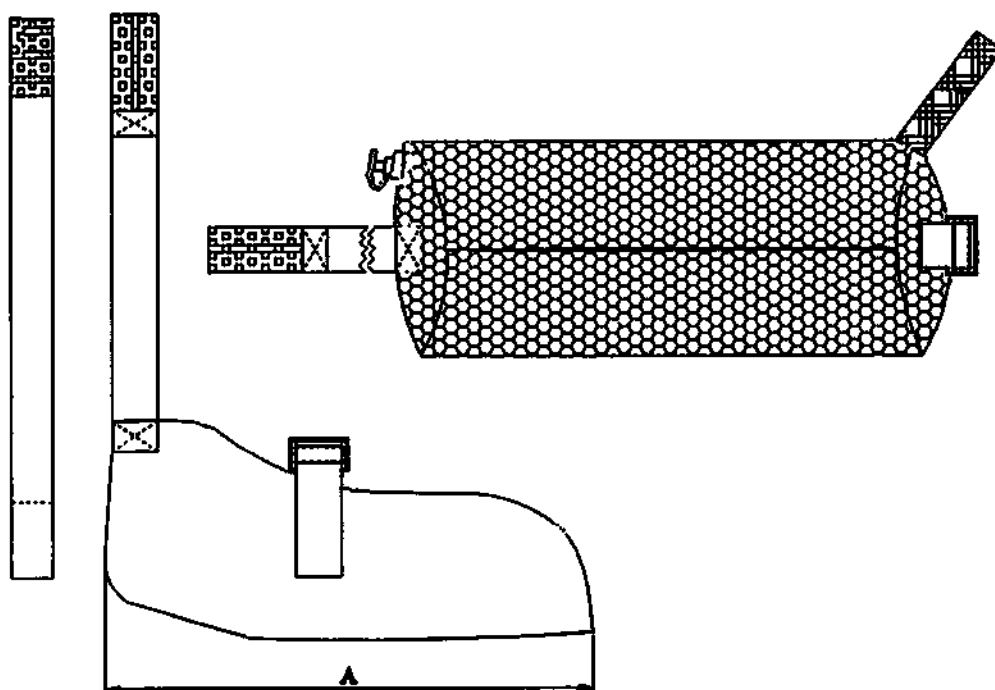

А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
45±1	465,8±5	511,6±5


Код 314 Бандаж-косынка для руки активный с воздушной подушкой

Предназначен для фиксации руки в согнутом положении на 90° и под углом к телу от 15° до 60°, угол к телу зависит от размера изделия и объема воздуха, закаченного в резиновый баллон, зафиксированный между рукой и телом.

Бандаж разгружает суставы всей верхней конечности, уменьшает болевые ощущения и отечность руки. Используется при растяжениях мышц и воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности, реабилитации после травм, операций на: плечевом суставе, лопатке, ключице, а также при гипсовой иммобилизации плеча и предплечья. Представляет собой единую систему из ремешков на застежках-липучках, которые фиксируют руку на баллоне. Резиновый баллон, сверху покрытый тканью, крепится к телу с помощью опоясывающего ремня на застежке-липучке.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном черном цвете и в одном из двух размеров: большом/big или маленьком/small. Изделие большого размера обеспечивает угол между рукой и телом от 30° до 60°, изделие маленького

размера о

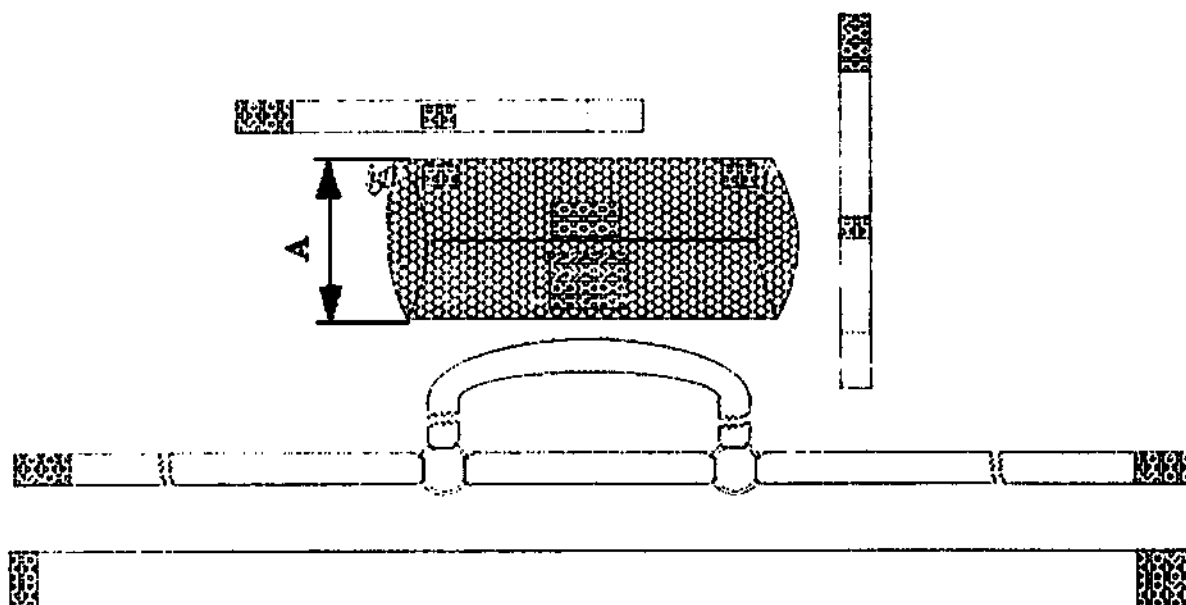

Размер	Диаметр подушки (A), см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Маленький	20±1	545,2±5	689,2±5
Большой	30±1	561,8±5	694,8±5


Код 315 Бандаж-косынка для руки эластичный

Предназначен для фиксации руки в согнутом на 90° положении, разгружает суставы всей верхней конечности, уменьшает болевые ощущения и отечность руки.

Используется при растяжениях мышц и воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности, реабилитации после травм, операций на: плечевом суставе, лопатке, ключице, а также при гипсовой иммобилизации плеча и предплечья.

Представляет собой карман из легкой синтетической сетчатой ткани, в котором предплечье располагается целиком, к карману с обоих краев прикреплен регулируемый ремень-подхват с пряжкой, который перекидывается через шею.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном черном цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

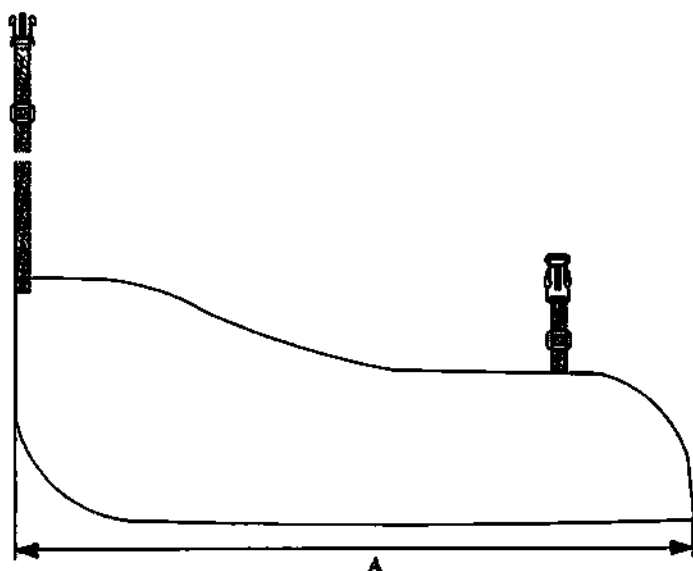


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Расстояние от кончика среднего пальца до вершины локтя, см	36-40	40-45	45-50
Длина А, см	40±1	45±1	50±1
Масса нетто, г	66,8±1	75,2±1	79,8±1
Масса брутто, г	96,6±1	105±1	109,6±1

Код 319 Бандаж эластичный с поддержкой большого пальца руки

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава и большого пальца руки. Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую прорезь с окантовкой для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава с помощью шнуровки и эластичного ремня, и в зоне большого пальца с помощью застежки липучки. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль внутренней поверхности руки и вдоль большого пальца вшиты металлические шины, способствующие фиксации положения лучезапястного сустава и большого пальца в линейном положении.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной черной расцветке и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

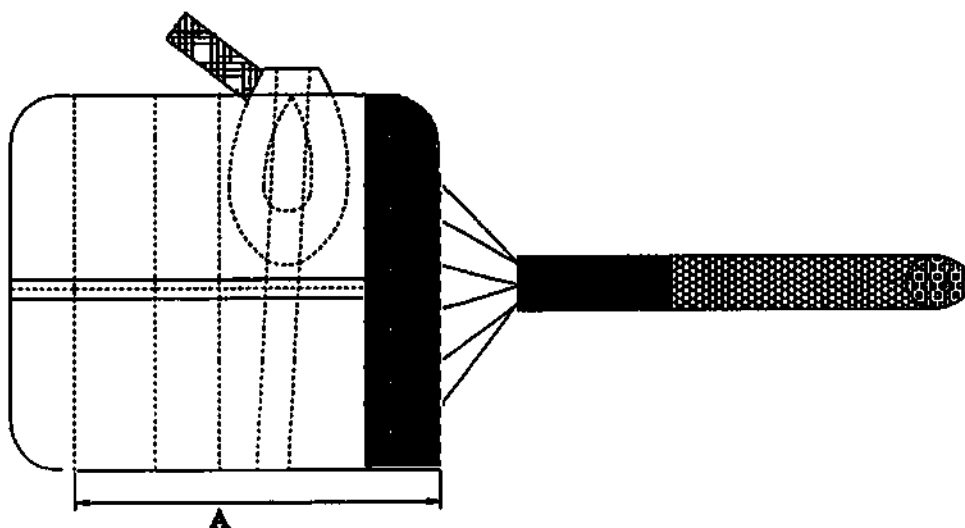

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Окружность запястья, см	13-16	16-19	19-22
Длина А, см	16±0,5	19±0,5	22±0,5
Масса нетто, г	112,6±1	114,8±1	117,6±1
Масса брутто, г	146,2±1	148,2±1	150,8±1


Код 323 Повязка для руки практичная

Предназначен для фиксации руки в согнутом на 90° положении, разгружает суставы всей верхней конечности, уменьшает болевые ощущения и отечность руки.

Используется при растяжениях мышц и воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности, реабилитации после травм, операций на: плечевом суставе, лопатке, ключице, а также при гипсовой иммобилизации плеча и предплечья.

Представляет собой ремень из мягкого синтетического трехслойного (средний слой-поролон) материала с застежками-липучками на концах, одним концом ремень фиксируется вокруг запястья, перекидывается через шею и другим концом фиксируется вокруг верхней части предплечья чуть ниже локтя.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном бежевом цвете и в одном универсальном размере.

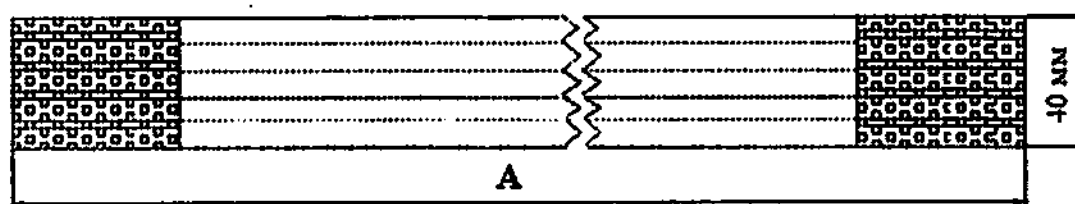


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
167±2	57,2±0,5	86±0,5

Код 460 Бандаж для плечевого сустава вязанный

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний плечевых суставов. Представляет собой бесшовную трикотажную трапецевидную трубку, которая используется в качестве замкнутой эластичной повязки на плечо, с широкого конца к повязке пришиты два конца фиксирующего ремня с пряжкой, который обхватывает тело под противоположной подмышкой, обеспечивая дополнительную фиксацию.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности локтя пациента.

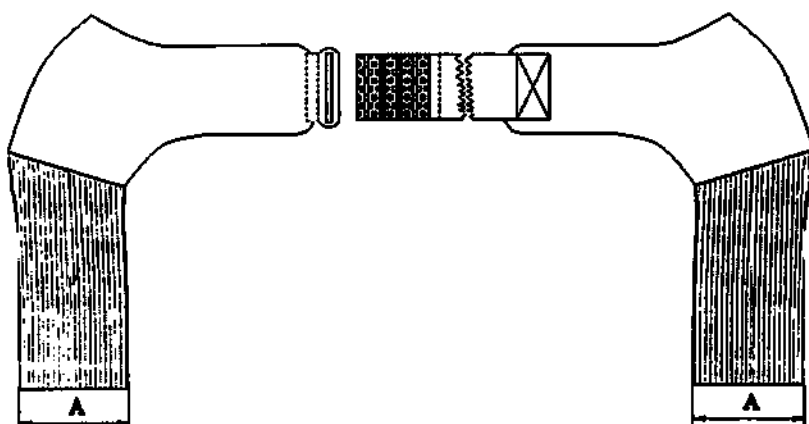

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность локтя, см	23-27	27-31	31-34	34-37
Длина А, см	10,5±0,5	11,5±0,5	12,5±0,5	13,5±0,5
Масса нетто, г	94±1	99±1	105±1	112±1

Масса брутто, г	133±1	138±1	145±1	151±1
-----------------	-------	-------	-------	-------


Код 465 Бандаж-шина на запястье эластичный вязанный

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава. Представляет собой трубку из плотного материала, имеющую прорезь для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и ладони с помощью застежек-липучек и эластичного ремня на застежке-липучке. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль внутренней поверхности руки вшита металлическая шина, способствующая фиксации положения лучезапястного сустава в линейном положении.

Бандаж для правой руки зеркально симметричен бандажу для левой руки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в 1 расцветке- черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

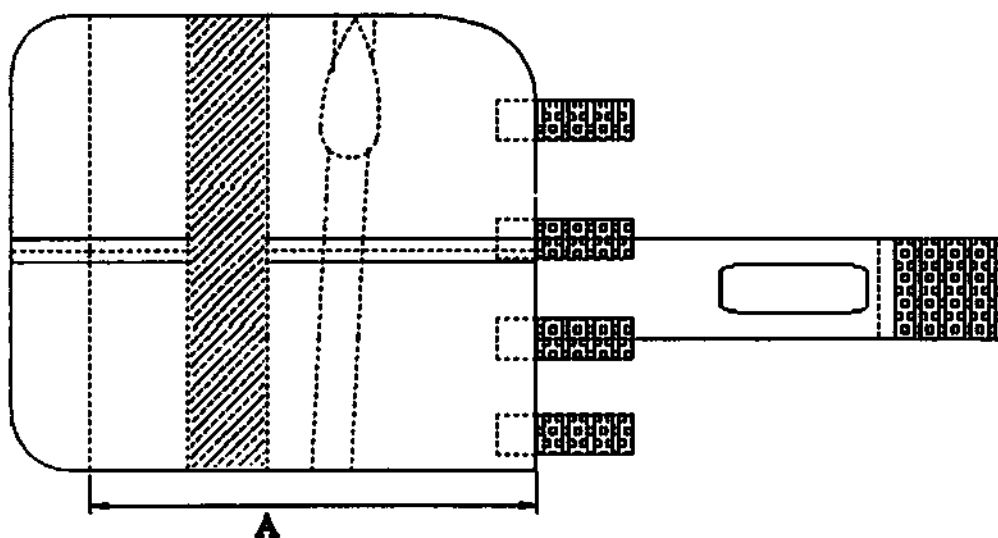


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность запястья, см	13-15	15-17	17-19	19-21
Длина А, см	13±0,5	15±0,5	17±0,5	19±0,5
Масса нетто, г	76±1	79,8±1	86,2±1	88,2±1
Масса брутто, г	110,4	113,4±1	120,2±1	122,2±1

Код 510 Бандаж-шина ночная мягкая для большого пальца ноги

Предназначен для консервативного лечения и послеоперационной реабилитации вальгусной деформации первого пальца стопы. Представляет собой повязку из мягкого синтетического трехслойного (средний слой-поролон) материала, которая оборачивается вокруг большого пальца ноги и ступни в плюсневой зоне и фиксируется на трех застежках-липучках. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль первой плюсневой кости вшита металлическая шина, способствующая уменьшению вальгусной деформации первого пальца стопы при периодическом ночном ношении бандажа.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном бежевом цвете и в одном универсальном размере.

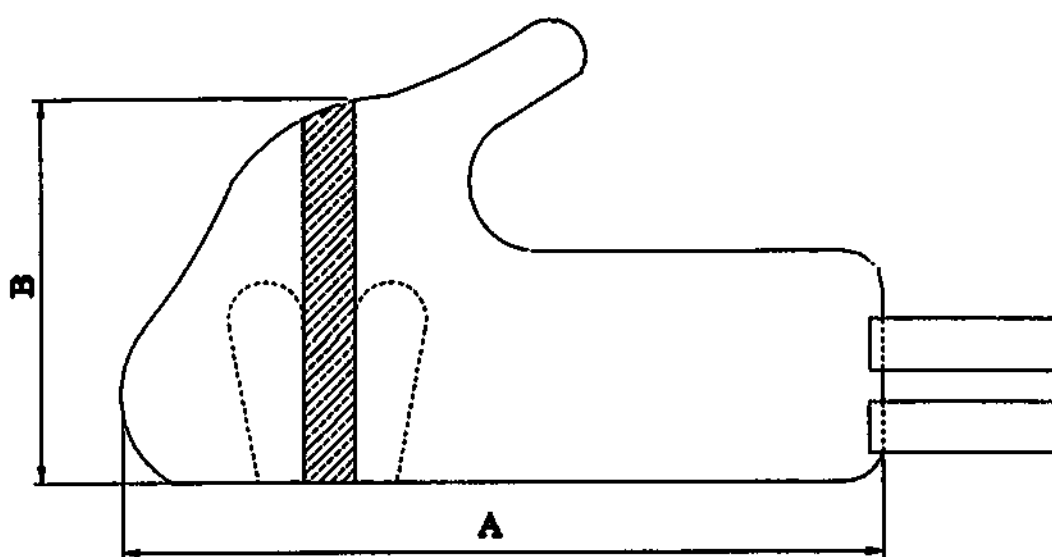


A, см	B, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
29±1	16±1	82,4±1	112,4±1

Код 511 Бандаж-шина ночная для большого пальца ноги

Предназначен для консервативного лечения и послеоперационной реабилитации вальгусной деформации первого пальца стопы. Представляет собой повязку из пластика, которая оборачивается вокруг большого пальца ноги и ступни в плюсневой зоне и фиксируется на застежке-липучке. Бандаж способствует уменьшению вальгусной деформации первого пальца стопы при периодическом ночном ношении.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется попарно в одном бежевом цвете и в одном универсальном размере.

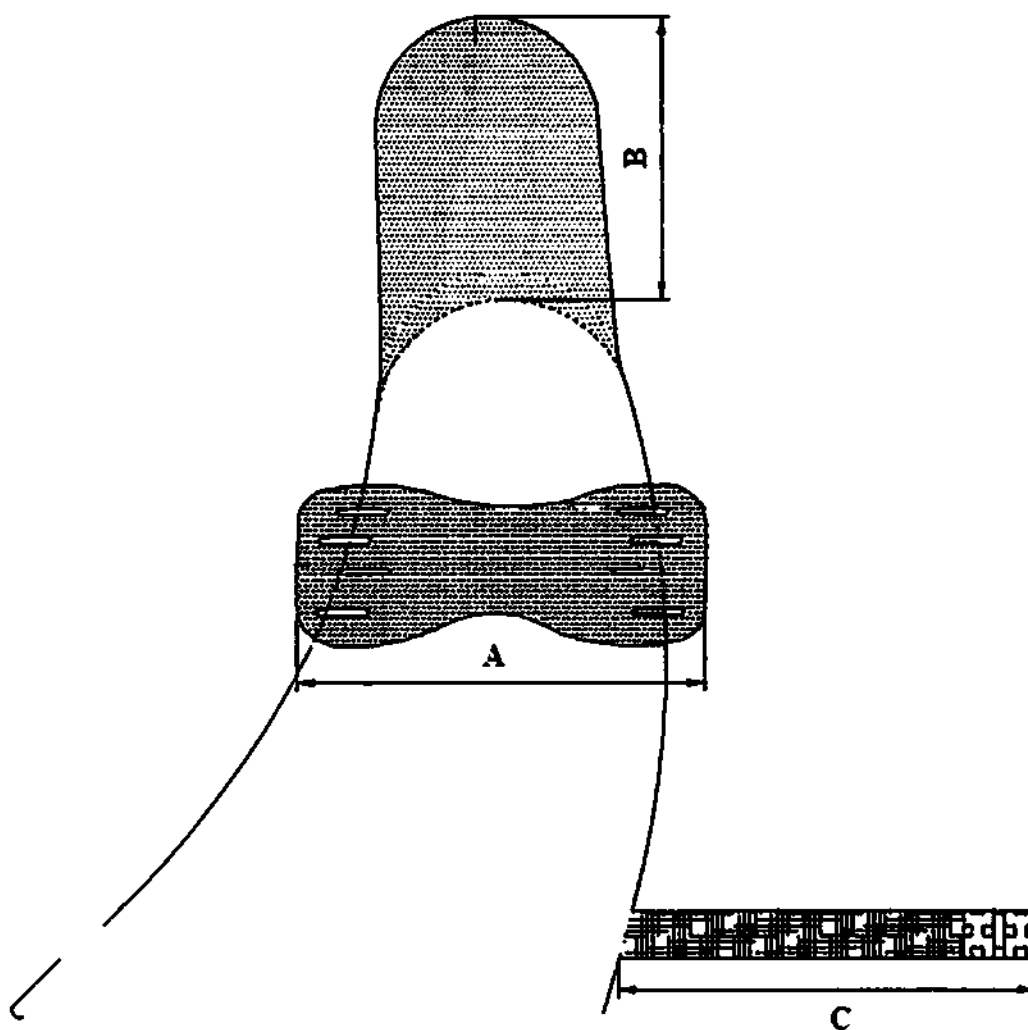


A, см	B, см	C, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
13,5±0,5	4,8±0,5	25±0,5	40,4±0,5	71±0,5

Код 760 Бандаж эпикондилитный

Предназначен для профилактики и лечения эпикондилита локтевого сустава.

Представляет собой тканевый ремень, размер которого регулируется с помощью застежки-липучки, с внутренней стороны которого имеется мягкая силиконовая вставка, размещающаяся в зоне крепления сухожилий мышц к выступам плечевой кости.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном черном цвете и в одном универсальном размере.

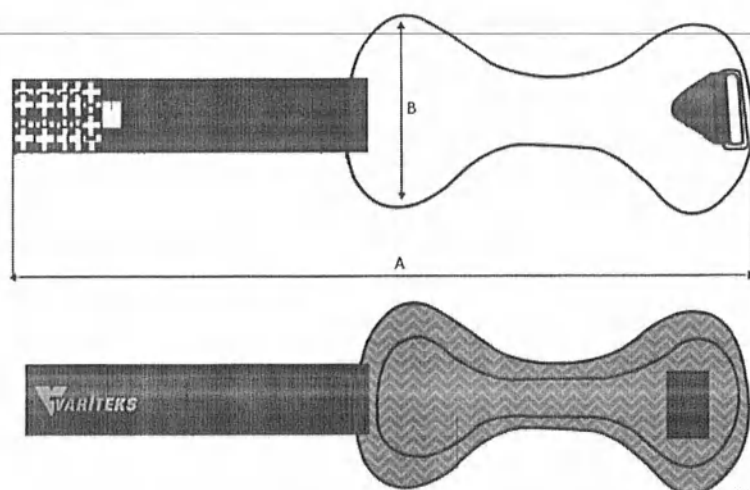

A, см	B, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
47±1	8,5±0,5	66±1	89±1


Код 823 Бандаж на колено со спиральными стержнями

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой трапецевидную трубку с круглым вырезом в районе надколенной чашечки, выполненную из мягкой эластичной неопреновой ткани, выше и ниже выреза к трубке пришиты фиксирующие ремни с застежками-липучками, слева и справа от выреза между основной тканью и подкладкой вшиты по 1 гибкому спиральному стержню.

Бандаж одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки, которая дополнительно фиксируется ремнями на липучках.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

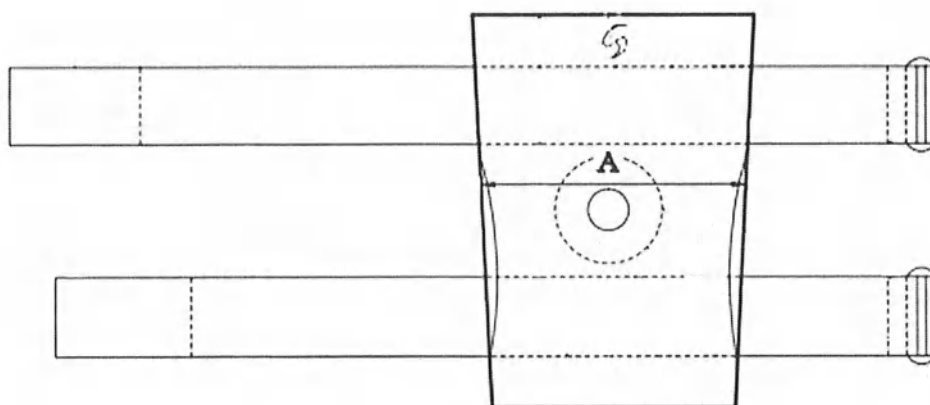


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50
Длина А, см	16±0,5	17±0,5	18±0,5	19±0,5	20±0,5
Масса нетто, г	241±3	251,3±3	271,4±3	287±3	295±3
Масса брутто, г	300,6±3	315,6±3	331,4±3	366,4±3	360,8±3

Код 824 Бандаж на лодыжку

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопного сустава и дополнительной поддержки лодыжки. Представляет собой повязку из мягкой эластичной неопреновой ткани, имеющую форму носка без кончика и без пятки, которая одевается на ступню, как носок. В зоне лодыжки бандаж дополнительно фиксируется эластичным ремнем на застежке-липучке.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

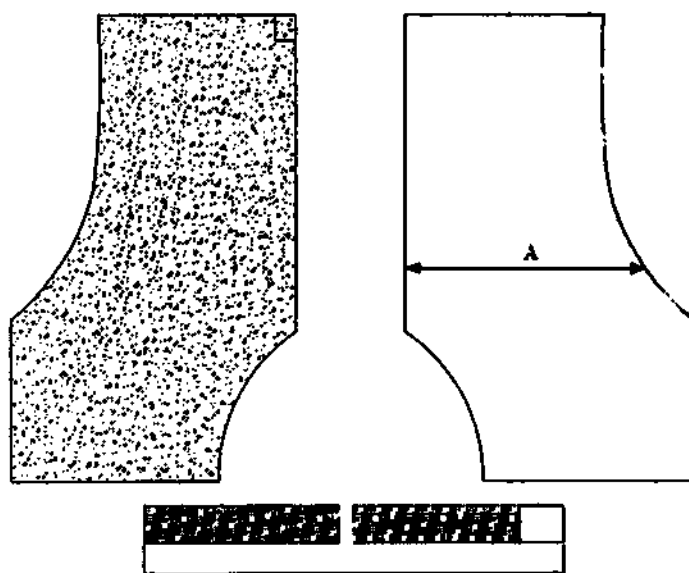

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33
Длина А, см	10±1	12±1	14±1	17±1

Масса нетто, г	73±1	95±1	101±1	107±1
Масса брутто, г	122,5±1	135±1	144±1	157±1


Код 825 Бандаж на запястье

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава. Представляет собой трубку из неопреновой ткани материала, имеющую прорезь для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и ладони с помощью застежек-липучек и эластичного ремня на застежке-липучке. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль внутренней поверхности руки вшита металлическая шина, способствующая фиксации положения лучезапястного сустава в линейном положении.

Бандаж для правой руки зеркально симметричен бандажу для левой руки.

Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 5-ти размеров: 0/XS (детский), 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента

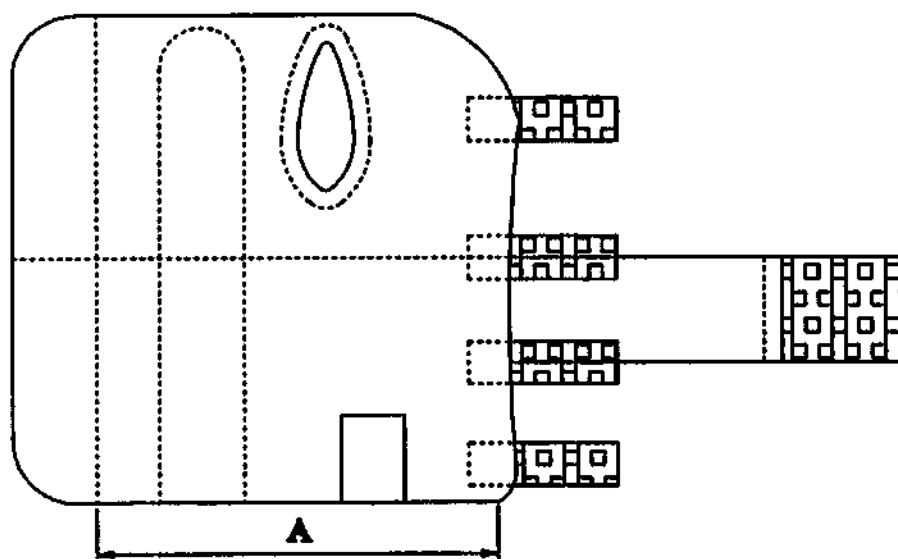

Размер бандажа	0/XS	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность запястья, см	11-14	13-15	15-17	17-19	19-22
Длина А, см	14±0,5	15±0,5	17±0,5	19±0,5	22±0,5
Масса нетто, г	44±1	84,2±1	96,2±1	108,2±1	116,6±1


Масса брутто, г	78,6±1	116,8±1	127,6±1	138,4±1	148±1
-----------------	--------	---------	---------	---------	-------

Код 827 Бандаж на лодыжку со спиральными ребрами

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопных суставов и дополнительной поддержки лодыжки. Представляет собой повязку из неопреновой ткани, имеющую форму носка без кончика и без пятки со шнуровкой, которая одевается на ступню, как носок. В зоне лодыжки между основной тканью и подкладкой размещено по одному спиральному ребру с каждой стороны, которые обеспечивают дополнительную поддержку лодыжки, зона лодыжки дополнительно фиксируется эластичным ремнем на застежке-липучке.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

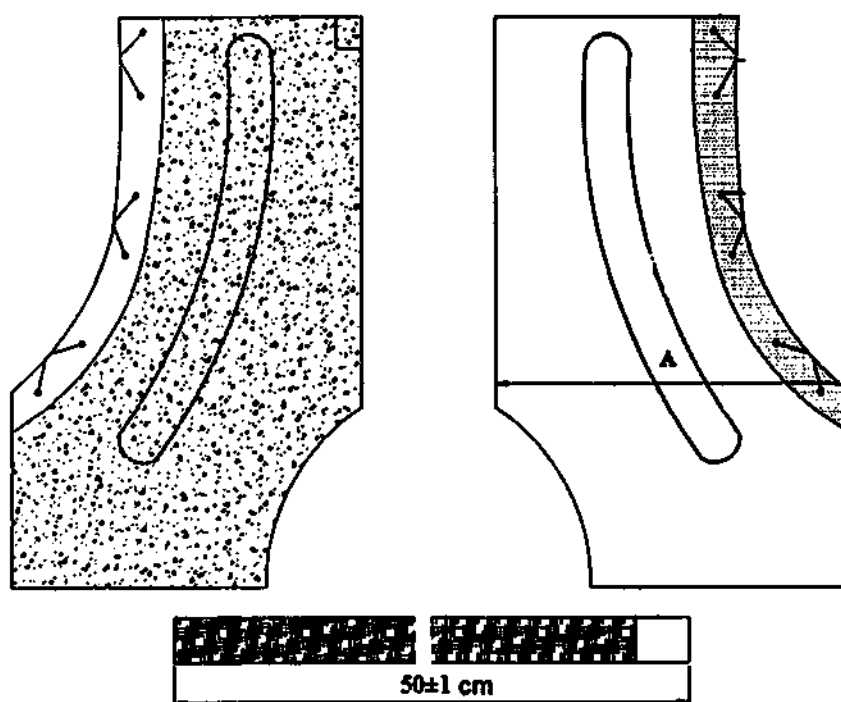

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33
Длина А, см	12±1	14±1	16±1	18±1
Масса нетто, г	117±1	130±1	139±1	160±1


Масса брутто, г	166±1	173,5±1	188±1	210±1
-----------------	-------	---------	-------	-------

Код 829 Бандаж для локтевого сустава

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний локтевого сустава. Представляет собой трапециевидную трубку из мягкой эластичной неопреновой ткани, которая фиксируется на локте, как замкнутая эластичная повязка. В зоне крепления сухожилий мышц к выступам плечевой кости бандаж дополнительно фиксируется эластичным ремнем на застежке-липучке.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности локтя пациента.

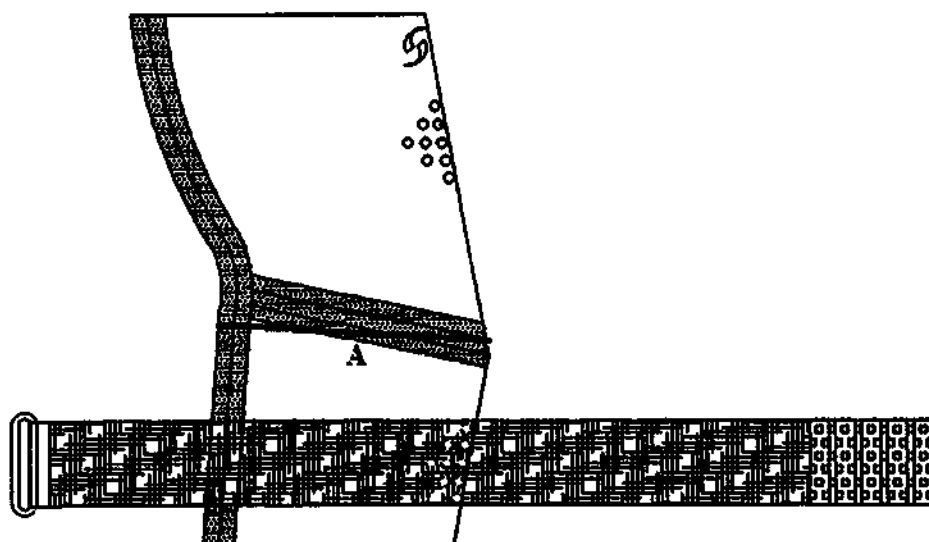

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность локтя, см	21-24	24-27	27-30	30-33
Длина А, см	9±0,5	11±0,5	13±0,5	15±0,5
Масса нетто, г	67±1	78±1	92±1	105±1
Масса брутто, г	115±1	127±1	141±1	154±1


Код 834 Бандаж на колено для перекрестных связок

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний и нестабильности коленного сустава. Представляет собой трапециевидную трубку с круглым вырезом в районе надколенной чашечки, выполненную из мягкой эластичной неопреновой ткани, вокруг выреза к трубке пришиты 8 фиксирующих ремней с застежками-липучками, обеспечивающих поддержку коленного сустава при слабости связок коленного сустава.

Бандаж одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки, которая дополнительно фиксируется ремнями на липучках.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

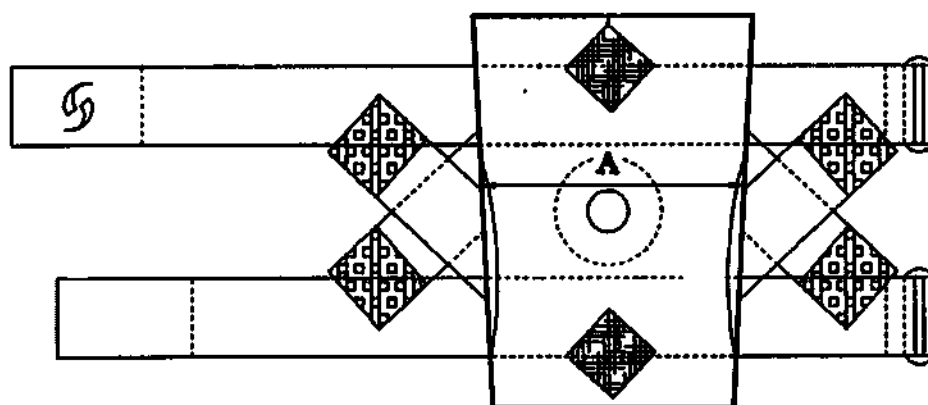


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50
Длина А, см	16±0,5	17±0,5	18±0,5	19±0,5	20±0,5
Масса нетто, г	310,8±3	324,3±3	342±3	353,4±3	361,2±3
Масса брутто, г	382,4±3	396,2±3	410±3	424±3	437,2±3

Код 842 Бандаж плечевого сустава

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний плечевых суставов. Представляет собой трапециевидную трубку из неопрена, которая используется в качестве замкнутой эластичной повязки на плечо, с широкого конца к повязке пришиты два конца фиксирующего ремня с пряжкой, который обхватывает тело под противоположной подмышкой, обеспечивая дополнительную фиксацию.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности локтя пациента.

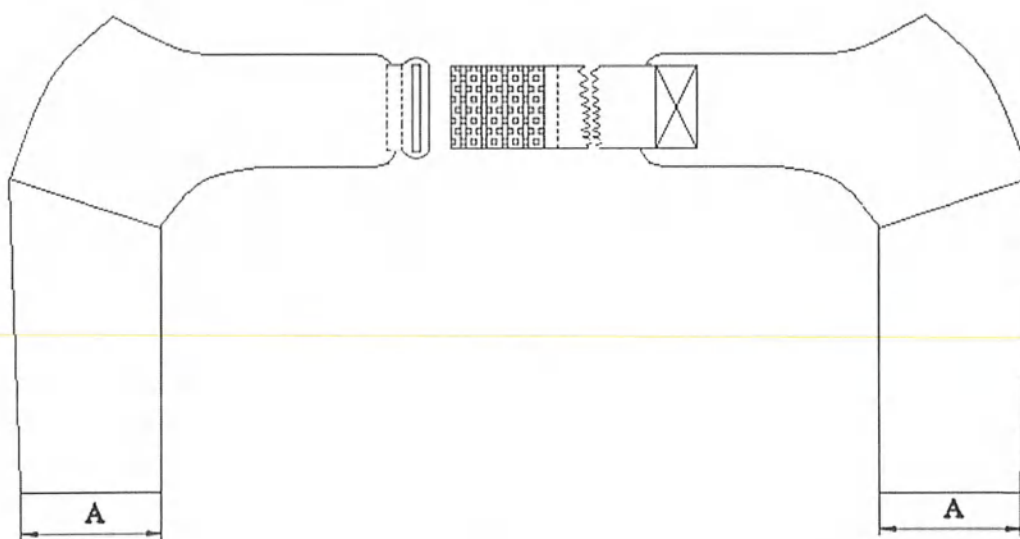


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность локтя, см	23-27	27-31	31-34	34-37
Длина А, см	9±0,2	10±0,2	11±0,2	12±0,2
Масса нетто, г	130±2	138±2	155±2	175±2
Масса брутто, г	175±2	182±2	197±2	227±2

Код 854 Бандаж голеностопного сустава со шнуровкой

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопных суставов и дополнительной поддержки лодыжки. Представляет собой повязку на ступню из неопреновой ткани, имеющую форму носка без кончика и без пятки со шнуровкой, которая одевается на ступню, как носок. В зоне лодыжки бандаж дополнительно фиксируется эластичным ремнем на застежке-липучке.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

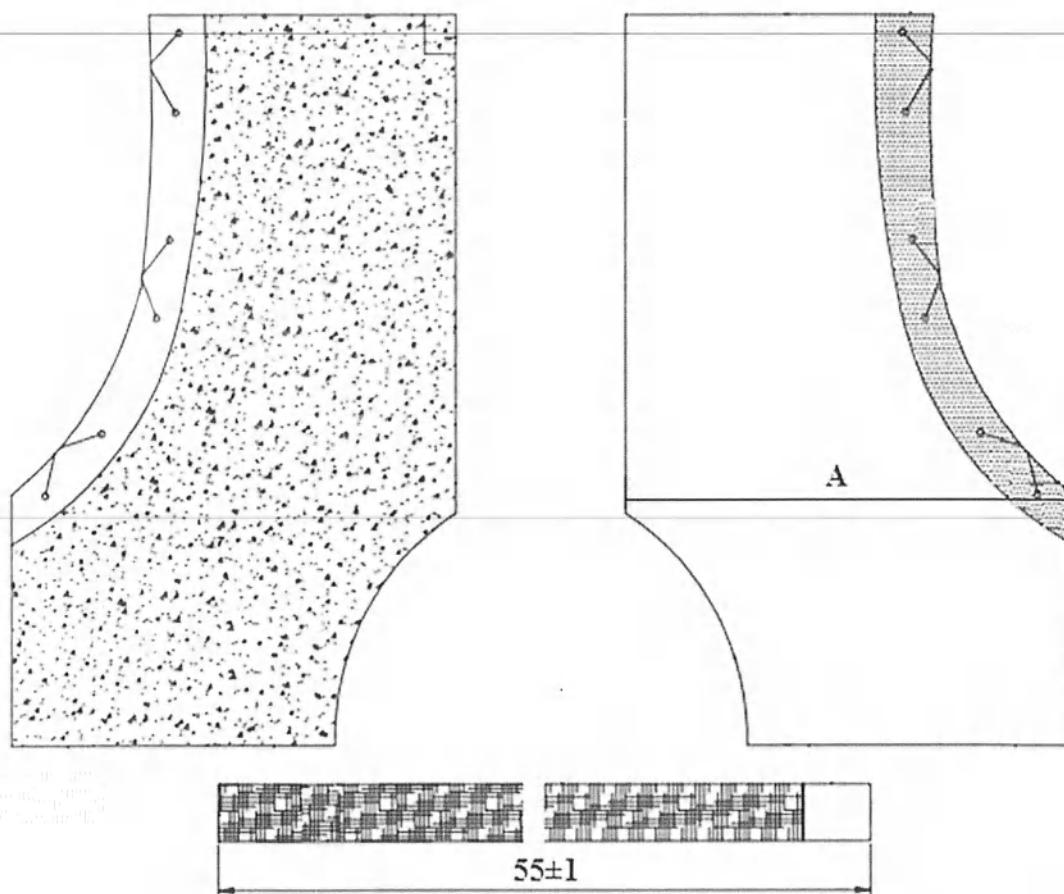


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Размер ноги	36-38	39-41	42-44
А, см	13±0,1	14±0,1	15±0,1
Масса нетто, г	149±2	167±2	175±2
Масса брутто, г	193±2	210±2	215±2

Код 863 Бандаж при падении стопы

Предназначен для консервативного лечения и послеоперационной реабилитации падения стопы. Представляет собой 2 повязки из мягкого материала, соединенные между собой шнурком. Первая повязка оборачивается вокруг ступни в плюсневой зоне, вторая вокруг щиколотки, обе повязки фиксируется на двух застежках-липучках, между собой повязки соединяются с помощью шнурка, который цепляется за 2 крючка на повязке вокруг щиколотки и за 1 крючок на плюсневой повязке.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном черном цвете и в одном из трех размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

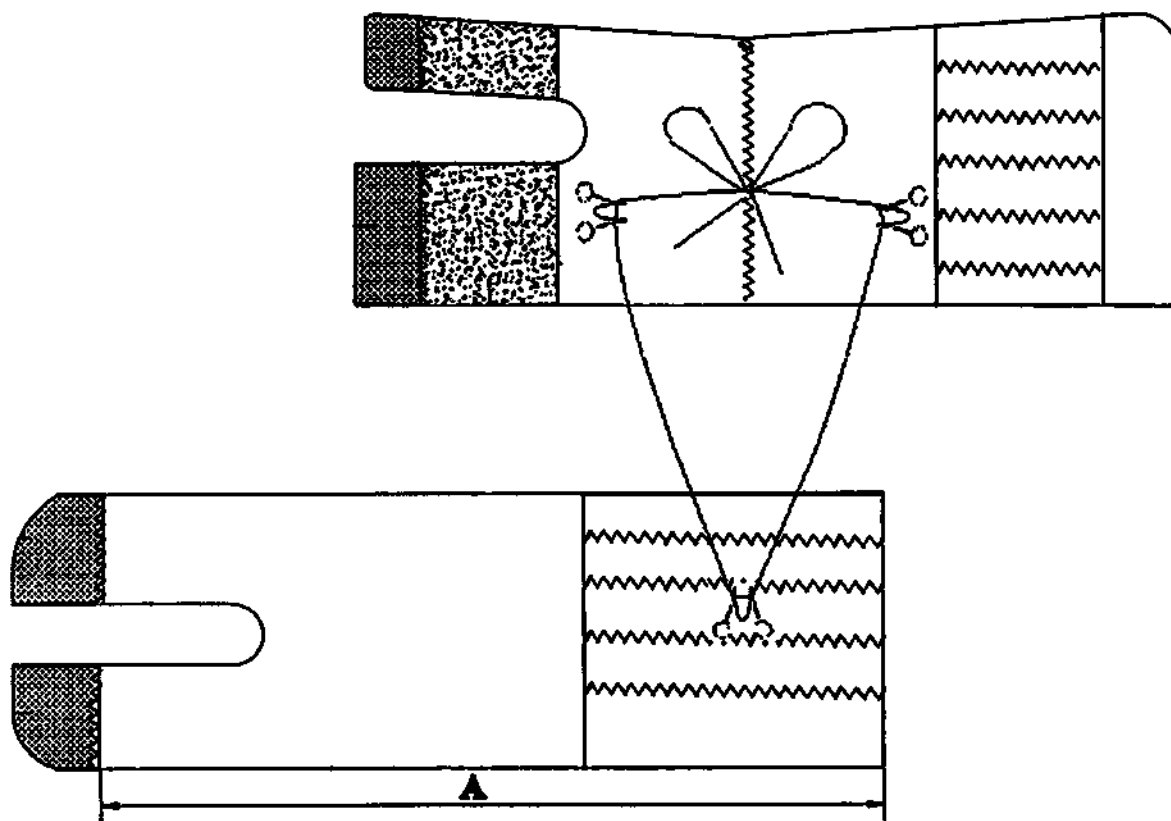


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Размер ноги	36-38	39-41	42-44
Окружность щиколотки, см	15-20	20-26	26-33
Длина А, см	18±1	24±1	30±1
Масса нетто, г	64±1	72±1	80±1
Масса брутто, г	88±1	94±1	100±1

Код 879 Бандаж на запястье

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава. Представляет собой трубку из эластичного неопренового материала, имеющую две прорези- для большого пальца левой и правой руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и ладони с помощью застежек-липучек и эластичного ремня с застежкой-липучкой. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль

внутренней поверхности руки вшита металлическая шина, способствующая фиксации положения лучезапястного сустава в линейном положении.


Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной синей расцветке и в одном универсальном размере.

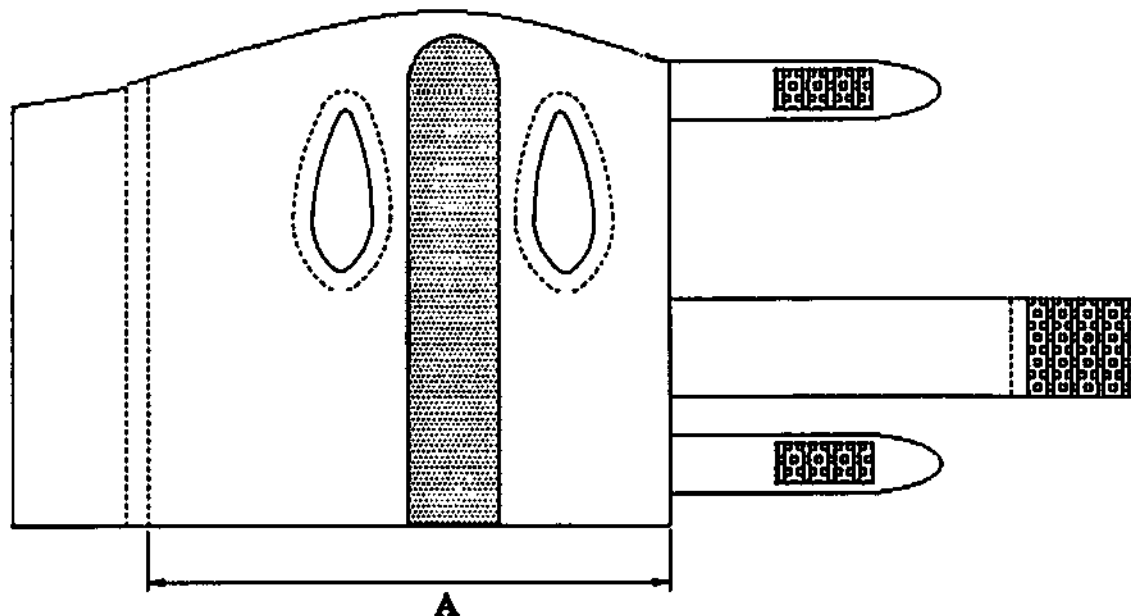

А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
20±1	111,6±2	145,4±2

Код 880 Бандаж большого пальца руки

Предназначен для поддержки и фиксации большого пальца руки. Представляет собой трубку из неопреновой ткани, имеющую прорезь для большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава и большого пальца с помощью застежек-липучек. Внутри изделия между основной тканью и подкладкой вдоль большого пальца вшита металлическая шина, способствующая фиксации положения большого пальца руки в линейном положении. Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном универсальном размере.

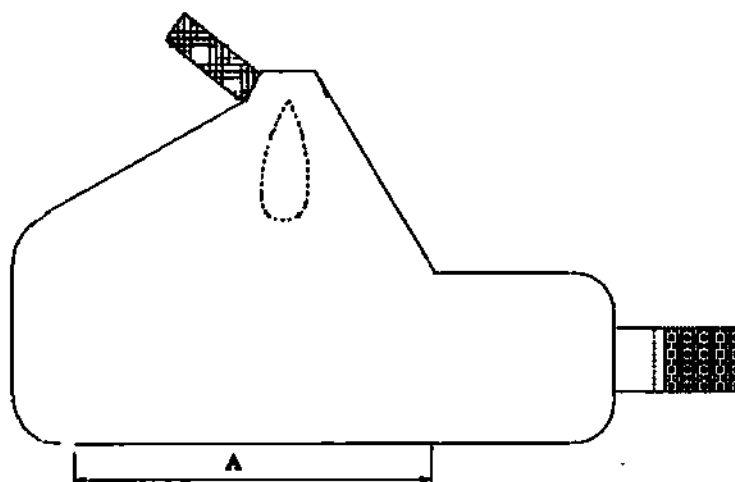


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
20±1	43,6±0,5	66±0,5

Код 881 Бандаж на запястье

Предназначен для поддержки, фиксации и лечения воспалительных заболеваний лучезапястного сустава. Представляет собой трубку из неопреновой ткани, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава с помощью эластичного ремня с застежкой-липучкой.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном универсальном размере.

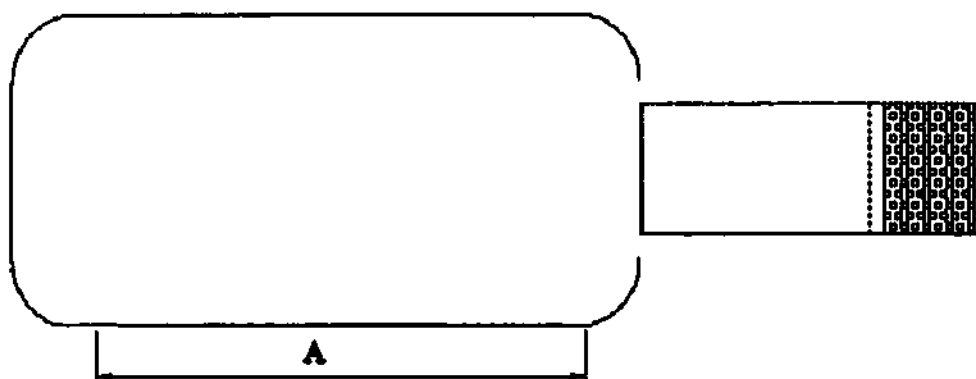


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
20±1	26,8±0,2	48,4±0,2

Код 882 Бандаж на запястье с фиксатором

Предназначен для поддержки и фиксации лучезапястного сустава. Представляет собой трубку из эластичного неопренового материала, имеющую прорезь для

большого пальца руки, фиксирующуюся на руке в зоне лучезапястного сустава с помощью эластичного ремня с застежкой липучкой и в зоне ладони с помощью застежки.

Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из двух размеров: универсальном детском или универсальном взрослом.

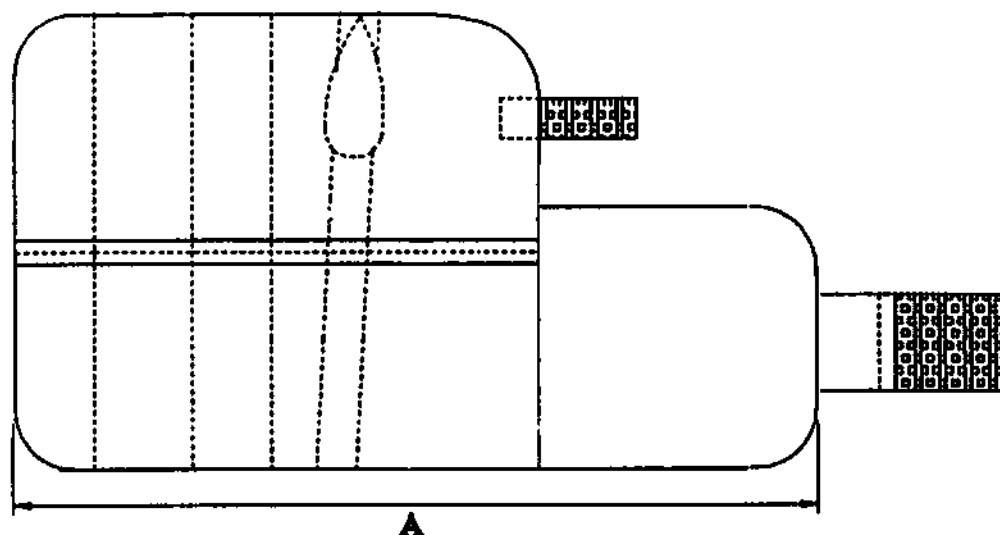


Размер	А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Универсальный детский	24±0,5	33±0,5	55±0,5
Универсальный взрослый	26±0,5	35,2±0,5	57,2±0,5

Код 883 Бандаж эпикондилитный

Предназначен для профилактики и лечения эпикондилита локтевого сустава.

Представляет собой тканевый ремень, размер которого регулируется с помощью застежки-липучки, с внутренней стороны которого имеется мягкая силиконовая вставка, размещающаяся в зоне крепления сухожилий мышц к выступам плечевой кости.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной расцветке- синей с черным, и в одном универсальном размере.

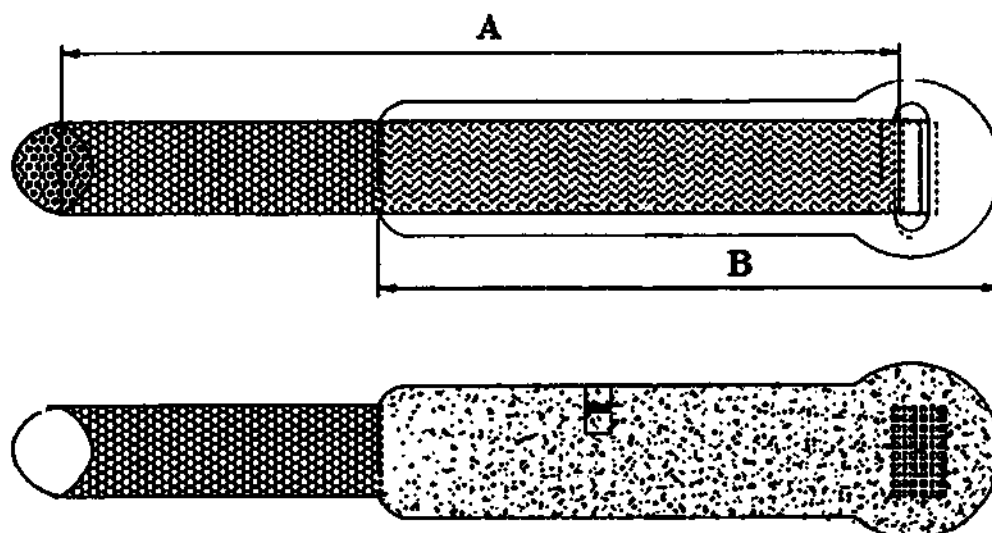


A, см	B, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
45±1	24±1	48,4±0,5	70,6±0,5

Код 884 Бандаж коленного сустава

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой полотно, выполненное из плотной согревающей неопреновой ткани, которое одевается на колено в виде эластичной трубчатой повязки и фиксируется с помощью трех эластичных ремней с застежками липучками, которые оборачивают бандаж в нижней, средней и верхней части.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном универсальном размере.

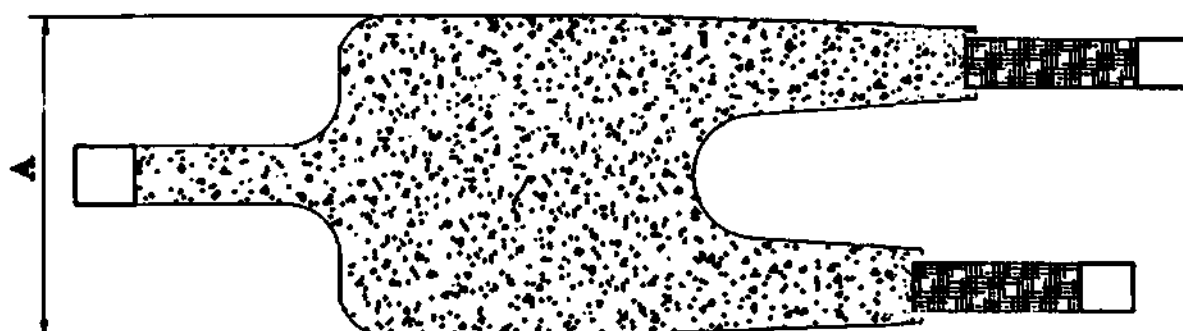


A, см	B, см	Масса нетто, г
29±1	103,8±1	154,4±1

Код 885 Бандаж коленного сустава открытый

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой полотно, выполненное из плотной согревающей неопреновой ткани с круглым вырезом в зоне коленной чашечки, которое одевается на колено в виде эластичной трубчатой повязки и фиксируется с помощью трех эластичных ремней с застежками липучками, которые оборачивают бандаж в нижней, средней и верхней части.

Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном из двух размеров: универсальном детском или универсальном взрослом.

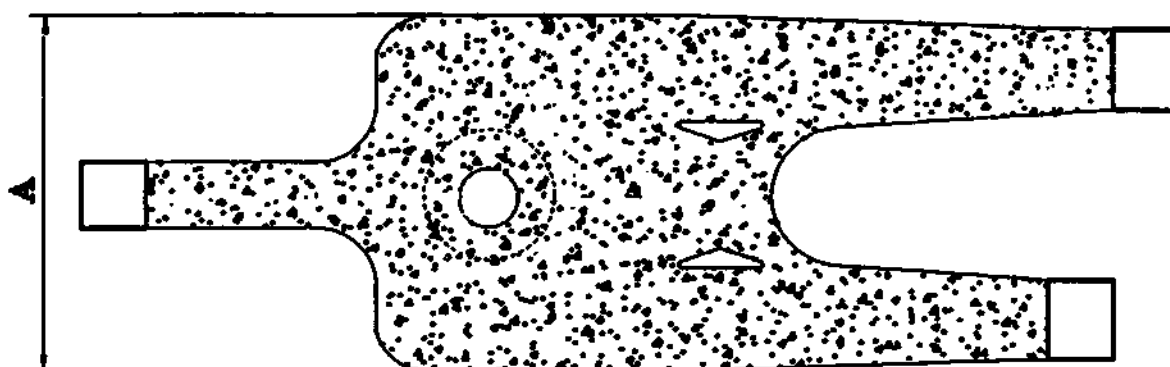


Размер	A, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Универсальный детский	21±1	110±1	160,1±1
Универсальный взрослый	29±1	113,4±1	166,2±1

Код 886 Бандаж для коленной чашечки

Предназначен для профилактики и консервативного лечения тендинита. Представляет собой тканевый ремень, размер которого регулируется с помощью застежки-липучки, с внутренней стороны которого имеется мягкая силиконовая вставка.

Ремень фиксируется вокруг колена в его нижней части, так чтобы силиконовая вставка находилась в зоне крепления надколенной связки к коленной чашечке.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной расцветке- синей с черным, и в одном универсальном размере.

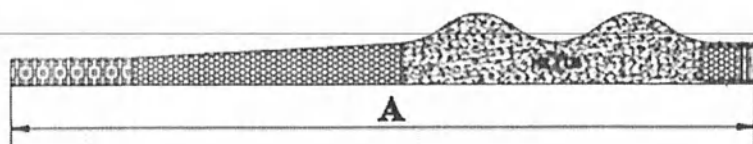


A, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
50±0,5	37,2±0,5	59±0,5

Код 887 Бандаж для щиколотки

Предназначен для поддержки и лечения воспалительных заболеваний голеностопного сустава. Представляет собой полотно, выполненное из плотной согревающей неопреновой ткани, которое обматывается вокруг ступни и щиколотки в виде эластичной трубчатой повязки имеющей вид носка без кончика и фиксируется с помощью эластичного ремня с застежкой-липучкой, который оборачивает бандаж в районе щиколотки и районе середины стопы.

Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном из двух размеров: универсальном детском или универсальном взрослом.

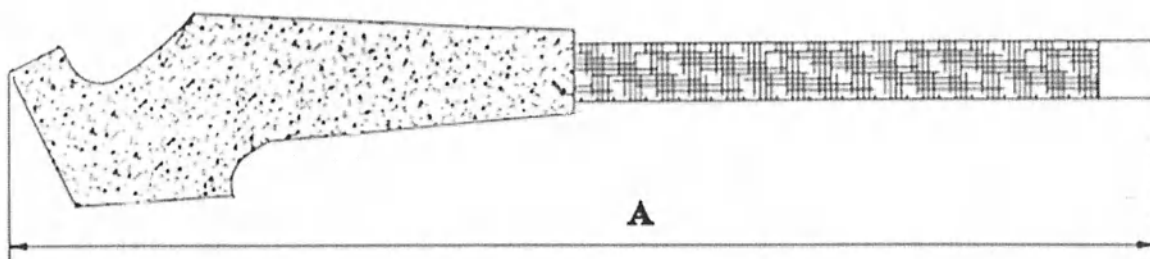


Размер	A, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Универсальный детский	66±1	79±1	115±1
Универсальный взрослый	68±1	83,4±1	119,4±1

Код 888 Бандаж для поддержки бедра

Предназначен для поддержки и лечения растяжений мышц бедра. Представляет собой полотно, выполненное из плотной согревающей неопреновой ткани, которое одевается на бедро в виде эластичной трубчатой повязки и фиксируется с помощью двух широких застежек-липучек..

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном универсальном размере.

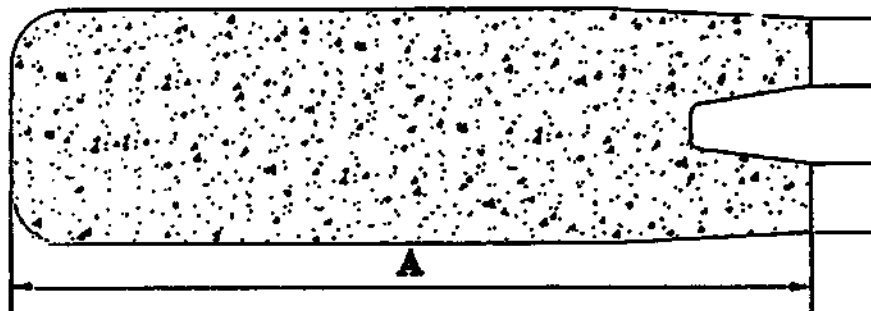


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
65±1	132±1	164±1

Код 892 Бандаж для поддержки икры

Предназначен для поддержки и лечения растяжений икроножной мышцы. Представляет собой полотно, выполненное из плотной согревающей неопреновой ткани, которое одевается на икру в виде эластичной трубчатой повязки и фиксируется с помощью трех широких застежек-липучек..

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном универсальном размере.

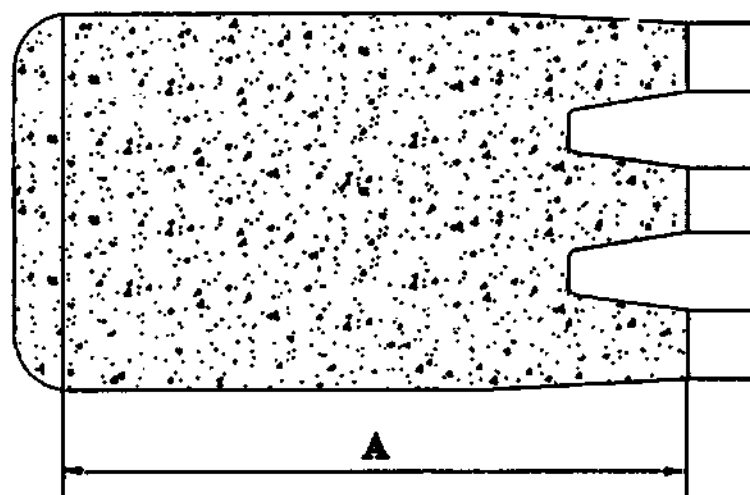


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
75±1	116,4±1	168,8±1

Код 893 Бандаж для коленного сустава со спиральными шинами

Предназначен для поддержки, фиксации и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой полотно, выполненное из плотной согревающей неопреновой ткани с круглым вырезом в зоне коленной чашечки и вшитыми между основной тканью и подкладкой спиральными шинами по левую и по правую сторону от выреза. Полотно одевается на колено в виде эластичной трубчатой повязки и фиксируется с помощью трех эластичных ремней с застежками липучками, которые оборачивают бандаж в нижней, средней и верхней части.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном универсальном размере.

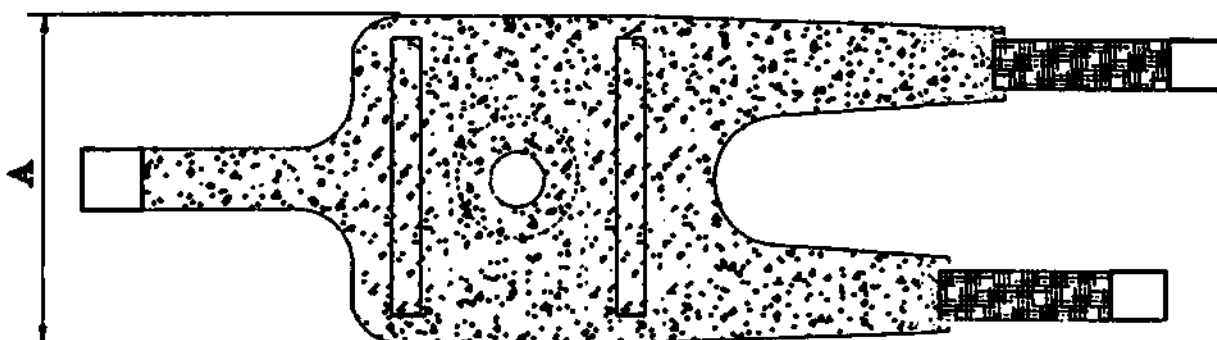


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
29±1	199±2	252,2±2

Код 894 Бандаж-стабилизатор коленного сустава

Предназначен для поддержки, фиксации и лечения воспалительных заболеваний коленного сустава. Представляет собой полотно, выполненное из плотной согревающей неопреновой ткани с круглым вырезом в зоне коленной чашечки и вшитыми между основной тканью и подкладкой шарнирами по левую и по правую сторону от выреза. Полотно одевается на колено в виде эластичной трубчатой повязки и фиксируется с помощью трех эластичных ремней с застежками липучками, которые оборачивают бандаж в нижней, средней и верхней части. С помощью шарниров можно зафиксировать нужный угол разведения коленного сустава.

Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном из двух размеров: универсальном детском или универсальном взрослом.

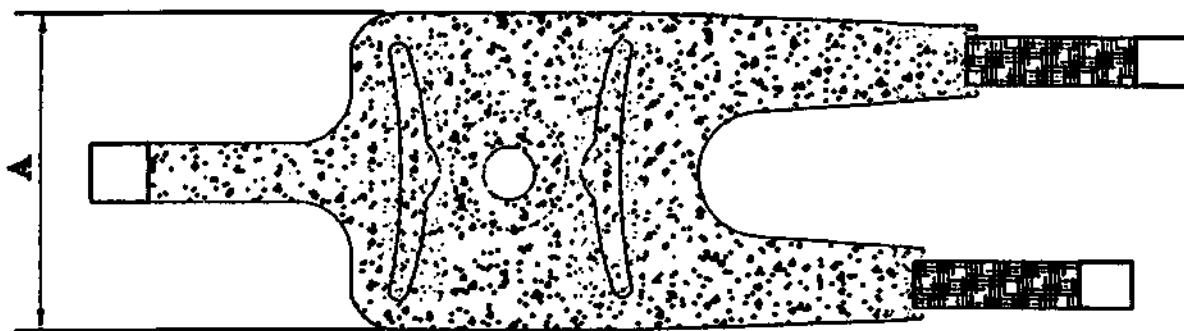


Размер	А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Универсальный детский	21±1	284±3	335±3
Универсальный взрослый	29±1	297±3	351,8±3

Код 897 Бандаж для щиколотки с гибкими стержнями

Предназначен для поддержки, фиксации и лечения воспалительных заболеваний голеностопного сустава. Представляет собой полотно, выполненное из плотной согревающей неопреновой ткани, которое обматывается вокруг ступни и щиколотки в виде эластичной трубчатой повязки имеющей вид носка без кончика и пятки, фиксируется с помощью эластичного ремня с застежкой-липучкой, который оборачивает бандаж районе щиколотки и в районе середины стопы. Вдоль щиколотки между основной тканью и подкладкой вшиты гибкие спиральные стержни, которые обеспечивают ей фиксацию.

Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном из двух размеров: универсальном детском или универсальном взрослом.

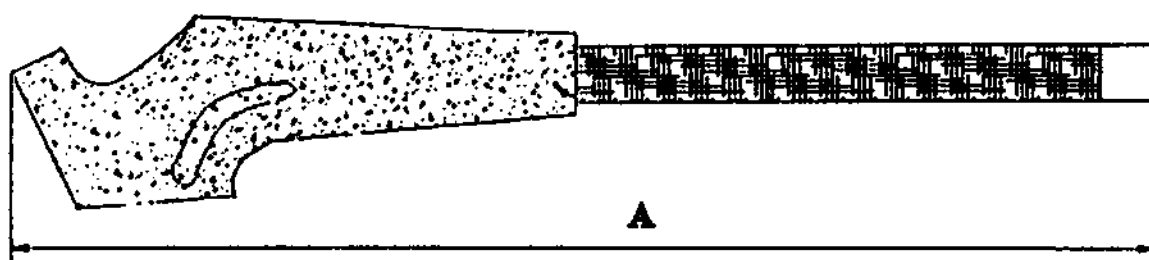

Размер	А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Универсальный детский	66±1	83,4±1	119,4±1
Универсальный взрослый	68±1	101,8±1	150±1

Группа III. Бандаж нерастяжимый представлена следующими вариантами исполнения:


Код 311 Бандаж-шина статическая на запястье

Предназначен для фиксации лучезапястного сустава и кисти руки. Представляет твердую основу из полиэтилена, повторяющую форму руки от нижней половины предплечья до кончиков пальцев, на которой рука фиксируется застежками-липучками в 5-ти положениях: в зоне предплечья, запястья, ладони, 4-х пальцев руки и большого пальца. Внутри основа имеет подкладку из махрового хлопка.

Бандаж для правой руки зеркально симметричен бандажу для левой руки.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной бежевой расцветке с черными ремнями и в одном из 2-х размеров: S-M, L-XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности запястья пациента.

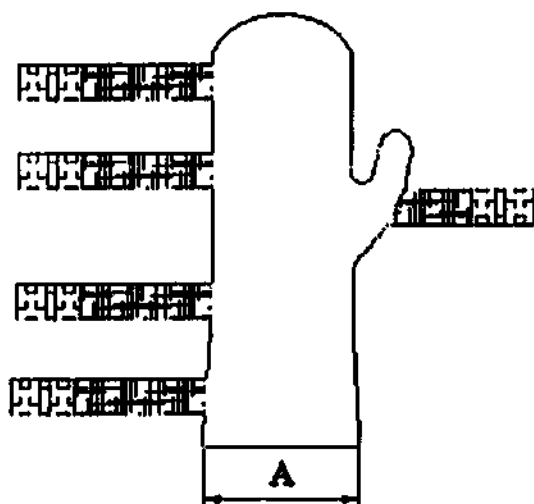

Размер бандажа	S-M	L-XL
Окружность запястья, см	13-19	19-25
Длина А, см	10±0,5	11,5±0,5
Масса нетто, г	186,6±2	218±2
Масса брутто, г	220±2	252,2±2

Код 320 Бандаж иммобилизатор колена

Предназначен для фиксации и иммобилизации коленного сустава. Представляет собой полотно, выполненное из плотной синтетической ткани с вшитыми между основной тканью и подкладкой тремя металлическими шинами, расположенными вдоль коленного сустава центру повязки, слева и справа от центра. Полотно одевается на колено в виде фиксирующей трубчатой повязки и фиксируется с помощью четырех ремней с застежками липучками.


Изделие предназначено для лиц старше 3 лет, поставляется в трех расцветках: бежевой с черным для детских размеров и черной или бежевой для взрослых размеров. и в одном из 8-ми размеров: 20 (детский), 25 (детский), 30 (детский), 35 (детский), 40, 50, 60, 70.

Размер бандажа	20	25	30	35	40	50	60	70
Высота бандажа (длина А), см	20±1	25±1	30±1	35±1	40±1	50±1	60±1	70±1
Масса нетто, г	196,2±2	240±2	290±2	329±2	435,4±2	594,8±2	706,8±2	796,8±2
Масса брутто, г	213,4±2	270±2	320±2	359±2	466,8±2	641±2	755,8±2	841,8±2

Код 331 Шина типа «Бейсбол»

Предназначена для фиксации и иммобилизации суставов пальца руки после переломов и растяжения связок. Представляет собой гибкую конструкцию из алюминия с подкладкой из мягкого пластазота, которая повторяет форму пальца и крепится под ним с помощью трех обхватов: один для фиксации вокруг средней фаланги и два для фиксации вокруг верхней фаланги пальца.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

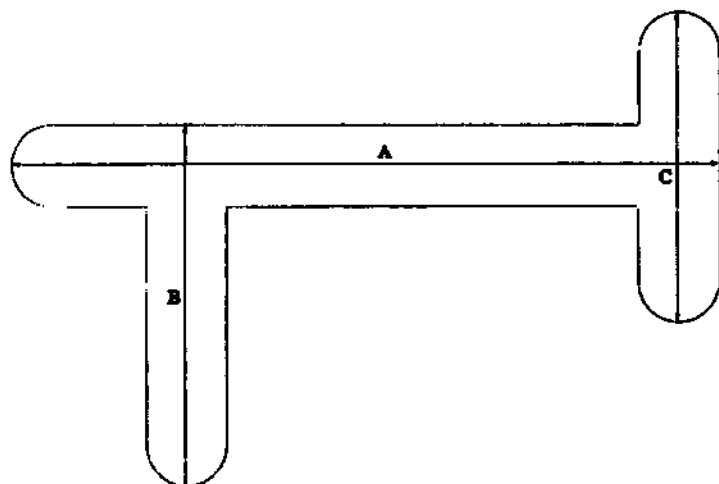


Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Длина пальца, см	6-8	8-10	10-12
А, см	12,0±0,1	14,0±0,1	16,0±0,1
В, см	6,5±0,1	7,5±0,1	8,5±0,1
С, см	4,5±0,1	5,5±0,1	6,5±0,1
Масса нетто, г	6,8±0,1	7,6±0,1	8,6±0,1
Масса брутто, г	8,2±0,1	9,0±0,1	10,6±0,1

Код 332 Шина пальцевая изогнутая

Предназначена для фиксации и иммобилизации суставов пальца руки после переломов и растяжения связок. Представляет собой гибкую конструкцию из алюминия с подкладкой из мягкого пластазота, которая повторяет форму пальца и крепится под ним с помощью бинта.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

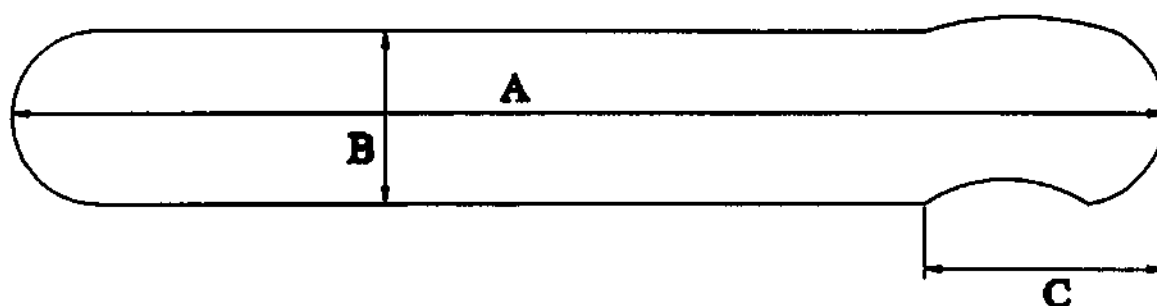


Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Длина пальца, см	6-8	8-10	10-12
А, см	7,5±0,1	9,5±0,1	11,5±0,1
В, см	2,2±0,1	2,4±0,1	2,6±0,1
С, см	2,2±0,1	2,4±0,1	2,6±0,1

Масса нетто, г	4,2±0,1	6,6±0,1	9,0±0,1
Масса брутто, г	5,4±0,1	8,4±0,1	10,6±0,1

Код 333 Шина для защиты пальца

Предназначена для фиксации и иммобилизации суставов пальца руки после переломов и растяжения связок. Представляет собой гибкую крестообразную конструкцию из алюминия с подкладкой из мягкого пластазота, центр которой располагается на вершине пальца, а 4 стороны крестовины загибаются вдоль пальца и обматываются бинтом, надежно фиксируя его положение.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

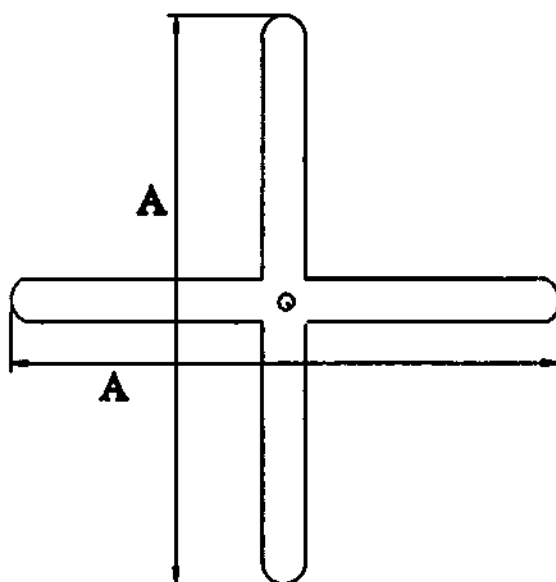


Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Длина пальца, см	6-8	8-10	10-12
A, см	17,0±0,1	18,0±0,1	19,0±0,1
Масса нетто, г	3,6±0,1	5,4±0,1	8,2±0,1
Масса брутто, г	5,2±0,1	7,4±0,1	10,0±0,1

Код 334 Шина типа «Раскладушка»

Предназначена для фиксации и иммобилизации суставов пальца руки после переломов и растяжения связок. Представляет собой гибкую линейную конструкцию из алюминия с подкладкой из мягкого пластазота, центр которой располагается на вершине пальца, а плечи загибаются вдоль пальца сверху и снизу, и обматываются бинтом, надежно фиксируя его положение.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

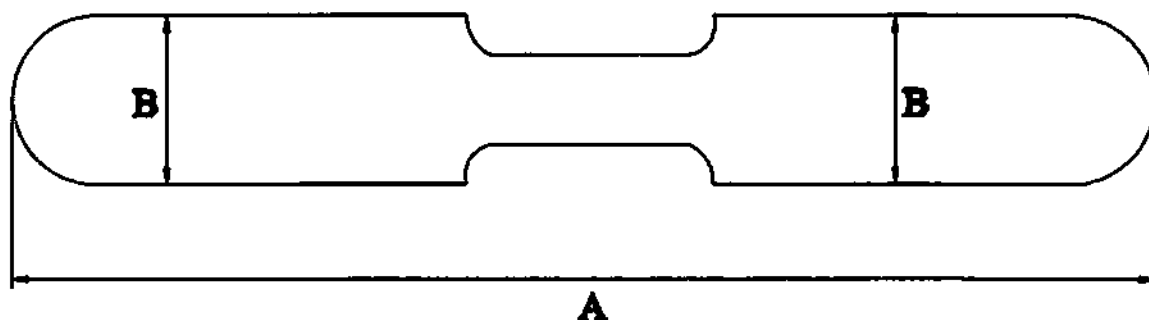


Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Длина пальца, см	6-8	8-10	10-12
А, см	15,0±0,1	17,0±0,1	19,0±0,1
В, см	2,3±0,1	2,5±0,1	2,7±0,1
Масса нетто, г	5,4±0,1	8,6±0,1	10,4±0,1
Масса брутто, г	6,8±0,1	9,8±0,1	12,0±0,1

Код 335 Шина типа «Лягушка»

Предназначена для фиксации и иммобилизации суставов пальца руки после переломов и растяжения связок. Представляет собой гибкую конструкцию из алюминия с подкладкой из мягкого пластазота, которая повторяет форму пальца и крепится под ним с помощью четырех обхватов: два для фиксации вокруг нижней фаланги и два для фиксации вокруг средней фаланги пальца.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

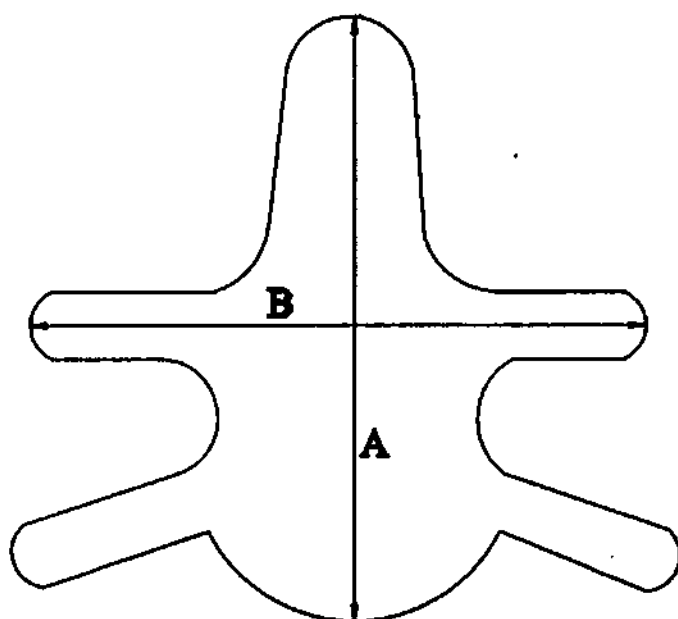


Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Длина пальца, см	6-8	8-10	10-12
А, см	6,2±0,1	7,2±0,1	8,2±0,1
В, см	6,2±0,1	7,2±0,1	8,2±0,1
Масса нетто, г	4,8±0,1	5,8±0,1	6,4±0,1
Масса брутто, г	6,4±0,1	7,8±0,1	8,0±0,1

Код 336 Шина кольцевая пальцевая

Предназначена для фиксации и иммобилизации суставов пальца руки после переломов и растяжения связок. Представляет собой твердую конструкцию из алюминия, покрытую со всех сторон силиконом, с подкладкой из мягкого черного неопрена. Конструкция обхватывает нижнюю и верхнюю фаланги одного пальца в виде двух незамкнутых полуколец, соединенных между собой двумя перемычками в местах разрыва, а поверх обматывается бинтом для более надежной фиксации её положения.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в сером или голубом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L

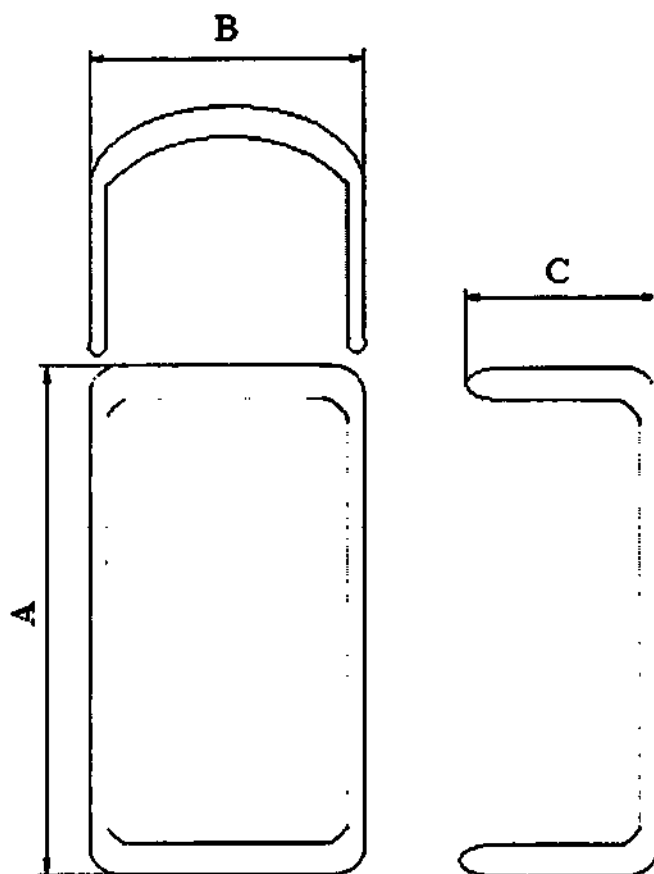


Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Длина пальца, см	6-8	8-10	10-12	12-13
A, см	5,2±0,1	6,0±0,1	6,5±0,1	8,0±0,1
B, см	2,2±0,1	2,5±0,1	3,2±0,1	3,8±0,1
C, см	2,2±,1	2,4±0,1	2,5±0,1	3,7±0,1
Масса нетто, г	2,0±0,1	4,0±0,1	6,0±0,1	8,0±0,1
Масса брутто, г	10,0±0,2	13,0±0,1	14,0±0,1	16,0±0,1

Код 340 Биндаж-шина большого пальца руки

Предназначен для поддержки и фиксации большого пальца руки в линейном положении. Представляет собой трубку из полиоксиметилена, которая фиксируется вокруг большого пальца руки и его основания с помощью ремней на застежке-липучке в районе запястья и второй фаланги большого пальца.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в черном или синем цвете и в одном из 2-х размеров: 1-2/S-M, 3-4/L-XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности большого пальца руки пациента.

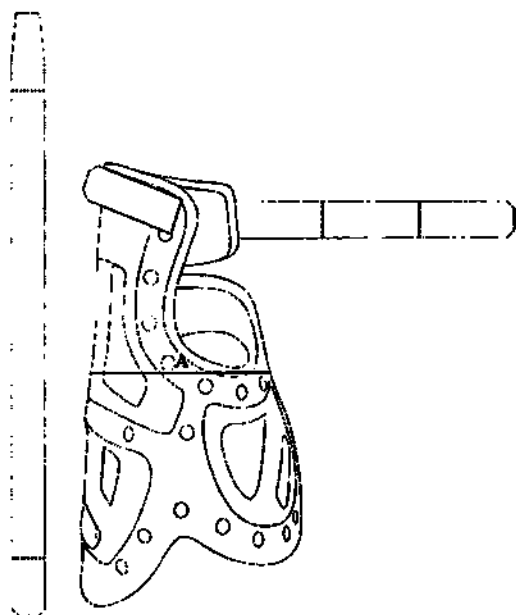

Размер биндажа	1-2/S-M	3-4/L-XL
Окружность запястья, см	13-18	18-23
Длина А, см	8±0,5	10,5±0,5
Масса нетто, г	30,8±0,2	33,2±0,2
Масса брутто, г	47±0,2	55±0,2

Код 345 Биндаж-шина большого пальца руки с дополнительной поддержкой

Предназначен для поддержки и фиксации большого пальца руки в линейном положении. Представляет собой трубку из полиоксиметилена, которая фиксируется вокруг большого пальца руки и его основания с помощью ремней на застежке-липучке вокруг запястья, первой и второй фаланги большого пальца.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в черном или синем цвете и в одном из 2-х размеров: 1-2/S-M, 3-4/L-XL.


Размер подбирается исходя из длины окружности большого пальца руки пациента.

Размер бандажа	1-2/S-M	3-4/L-XL
Окружность запястья, см	13-18	18-23
Длина А, см	8±0,5	10,5±0,5
Масса нетто, г	32,7±0,2	35,4±0,2
Масса брутто, г	49±0,2	57±0,2

Код 454 Бандаж на колено трикотажный шарнирный

Предназначен для фиксации и иммобилизации коленного сустава. Представляет собой бесшовную трикотажную трубку с двумя вшитыми между двух слоев ткани шарнирами по левую и по правую сторону от коленного сустава, которая одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки. С помощью регулируемых шарниров можно зафиксировать нужный угол разведения коленного сустава.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной расцветке черной с зелеными вкраплениями, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

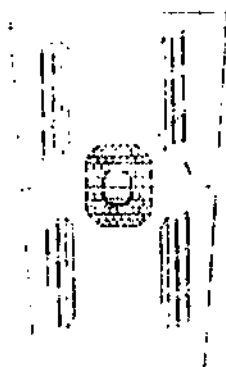


Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50
Длина А, см	14±0,5	15±0,5	16±0,5	17±0,5	18±0,5
Масса нетто, г	300±5	307,4±5	323,8±5	335±5	342±5
Масса брутто, г	356,6±5	364±5	380±5	391,2±5	395±5

Код 501 Твердая стелька для стопы

Предназначена для поддержки арки стопы и консервативного лечения плоскостопия. Представляет собой металлическую стельку из алюминия с покрытием из полиуретана с выраженной аркой и без зоны носка, которая размещается внутри обуви вместо обычной стельки.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 3 лет, представлено в одной коричневой расцветке, и в одном из 27-ти размеров: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

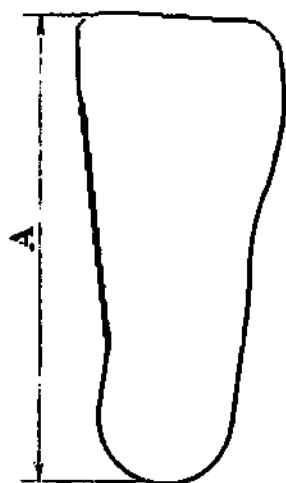


Размер	А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
18	8,5±0,1	38,9±0,1	65,1±0,1
19	9±0,1	40,1±0,1	67,2±0,1
20	9,5±0,1	41,2±0,1	68,8±0,1
21	10±0,1	42,2±0,1	69,4±0,1
22	10,5±0,1	44,0±0,1	69,8±0,1
23	11±0,1	45,0±0,1	71,0±0,1
24	11,5±0,1	46,6±0,1	74,4±0,1
25	12±0,1	48,0±0,1	76,0±0,1
26	12,5±0,1	52,0±0,1	79,0±0,1
27	13±0,1	56,4±0,1	84,2±0,1
28	13,5±0,1	63,0±0,1	87,6±0,1
29	14±0,1	71,2±0,1	90,0±0,1
30	14,5±0,1	87,6±0,1	115,2±0,1
31	15±0,1	89,8±0,1	117,4±0,1
32	15,5±0,1	94,8±0,1	123,0±0,1
33	16±0,1	93,0±0,1	125,0±0,1
34	16,5±0,1	100,4±0,1	128,2±0,1
35	17±0,1	107,0±0,1	136,6±0,1
36	17,5±0,1	108,0±0,1	148,0±0,1
37	18±0,1	123,8±0,1	151,6±0,1
38	18,5±0,1	127,2±0,1	153,2±0,1
39	19±0,1	130,4±0,1	158,2±0,1
40	19,5±0,1	134,2±0,1	162,9±0,1
41	20,5±0,1	148,2±0,1	176,0±0,1
42	21±0,1	143,2±0,1	178,2±0,1
43	21,5±0,1	157,0±0,1	187,9±0,1
44	22±0,1	161,6±0,1	189,6±0,1

Код 541 Силиконовая стелька с поддержкой арки

Предназначена для поддержки арки стопы и консервативного лечения плоскостопия и пяточной шпоры. Представляет собой силиконовую стельку с выраженной аркой, которая размещается внутри обуви вместо обычной стельки.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной расцветке- белой с голубыми пятнами, и в одном из 6-ти размеров: 0/XS, 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL

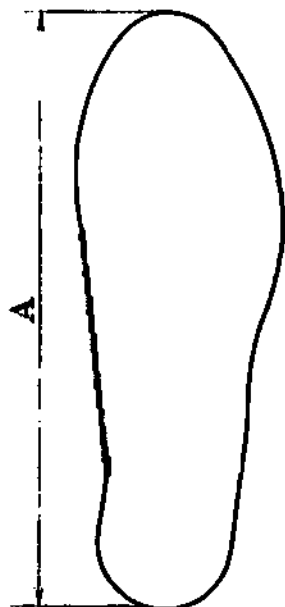


Размер стельки	0/XS	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Размер ноги	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
Длина А, см	22,5±0,2	23,5±0,2	24,5±0,2	26±0,2	27,5±0,2	28,5±0,2
Масса нетто, г	200,4±2	214,2±2	239,0±2	278,4±2	302,8±2	304,0±2
Масса брутто, г	249,6±2	262,2±2	286,6±2	342,4±2	351,0±2	356,4±2

Код 542 Силиконовая стелька полной длины

Предназначена для поддержки стопы и консервативного лечения пяточной шпоры. Представляет собой силиконовую стельку классической формы, повторяющей форму ступни, которая размещается внутри обуви вместо обычной стельки.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной расцветке- белой с голубыми пятнами, и в одном из 6-ти размеров: 0/XS, 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL

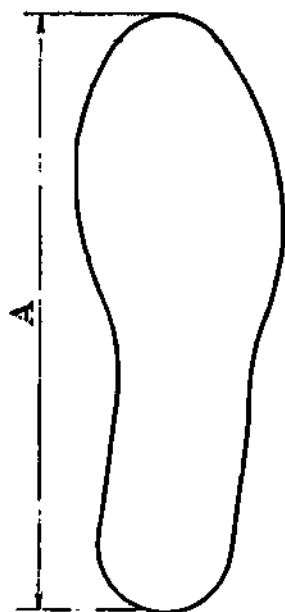


Размер стельки	0/XS	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Размер ноги	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
Длина А, см	22,5±0,2	23,5±0,2	24,5±0,2	26±0,2	27,5±0,2	28,5±0,2
Масса нетто, г	152,8±2	175,6±2	194,8±2	215,0±2	233,0±2	262,6±2
Масса брутто, г	210,8±2	223,2±2	258,2±2	274,0±2	292,2±2	326,2±2

Код 543 Силиконовая стелька 1/2 длины

Предназначена для поддержки арки стопы и консервативного лечения плоскостопия и пяточной шпоры. Представляет собой силиконовую стельку без переднего края с выраженной аркой, которая размещается внутри обуви вместо обычной стельки. Данная модель стелек подходит для обуви с открытым носком.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной расцветке- белой с голубыми пятнами, и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL

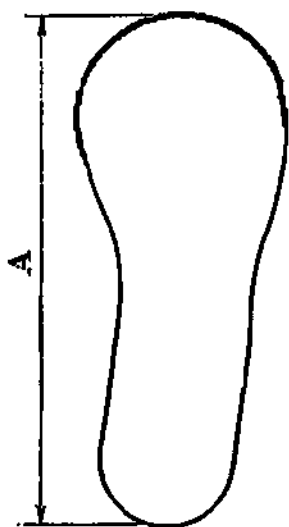


Размер стельки	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Размер ноги	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
Длина А, см	16±0,2	17±0,2	18±0,2	19±0,2	20±0,2
Масса нетто, г	128,4±2	171,8±2	190,4±2	195,0±2	200,0±2
Масса брутто, г	171,0±2	214,8±2	233,0±2	237,8±2	240,0±2

Код 544 Силиконовая стелька под пятку

Предназначена для поддержки пятки и консервативного лечения пяточной шпоры. Представляет собой силиконовую стельку без средней части и переднего края, которая размещается внутри обуви в районе пятки. Данная модель стелек подходит для обуви с открытым носком.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной расцветке- белой с голубым пятном, и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

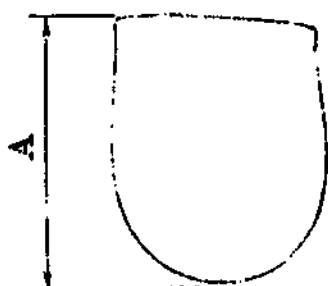


Размер стельки	1/S	2/M	3/L	4/XL
Размер ноги	35-37	38-40	41-43	44-46
Длина А, см	9±0,2	10±0,2	11±2	12±0,2
Масса нетто, г	53,4±2	85,0±2	109,2±2	133,4±2
Масса брутто, г	83,4±2	104,2±2	138,8±2	163,8±2

Код 545 Силиконовая межпальцевая перегородка

Предназначена для консервативного и послеоперационного лечения вальгусной деформации первого пальца стопы. Представляет собой силиконовую прокладку, которая размещается между первым и вторым пальцем стопы.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одном белом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

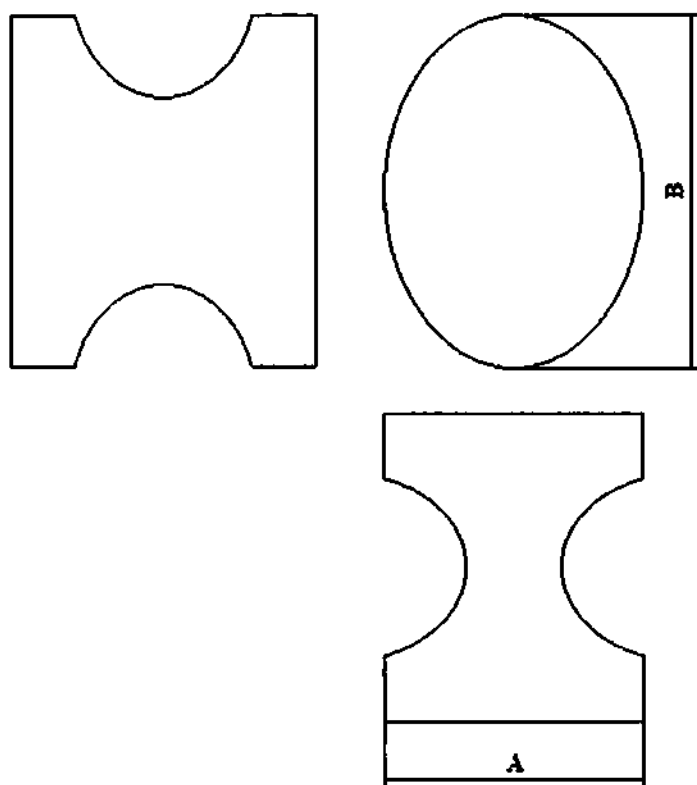


Размер перегородки	1/S	2/M	3/L
Размер ноги	35-38	39-42	43-46

Длина А, см	2,0±0,1	2,2±0,1	2,4±0,1
Длина В, см	3,0±0,1	3,2±0,1	3,4±0,1
Масса нетто, г	11,2±0,1	17,2±0,1	22,4±0,1
Масса брутто, г	17,6±0,1	23,0±0,1	27,6±0,1

Код 546 Силиконовый межпальцевый клин

Предназначен для послеоперационного лечения пальцев стопы и консервативного лечения повреждений мягких тканей пальцев стопы. Представляет собой силиконовую прокладку, которая размещается между пальцами стопы и защищает их от взаимного повреждения.

Изделие предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одном белом цвете и в одном из 2-х размеров: 1-2/S-M, 3-4/L-XL.

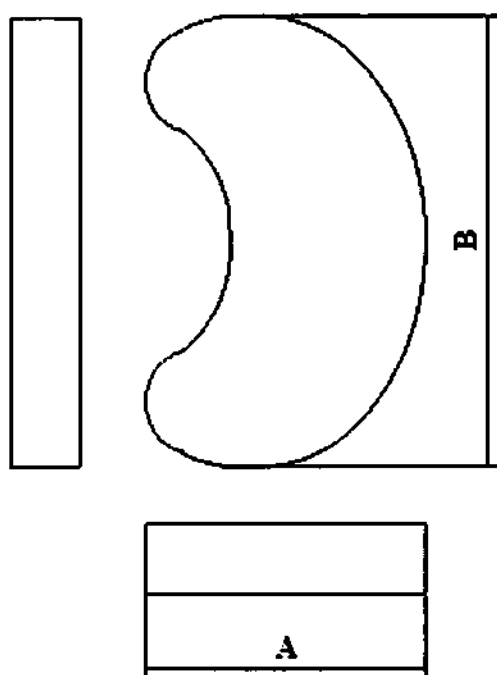


Размер клина	1-2/S-M	3-4/L- XL
Размер ноги	35-40	41-46
Длина А, см	3,0±0,1	3,5±0,1
Длина В, см	2,0±0,1	2,5±0,1

Масса нетто, г	7,2±0,1	11±0,1
Масса брутто, г	13,6±0,1	17,6±0,1

Код 547 Силиконовое межпальцевое кольцо

Предназначено для фиксации пальца стопы и консервативного лечения повреждений мягких тканей пальцев стопы. Представляет собой силиконовую трубку, которая одевается на любой палец стопы, фиксирует его положение и защищает его от повреждения соседними пальцами и обувью.

Изделие предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одном белом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

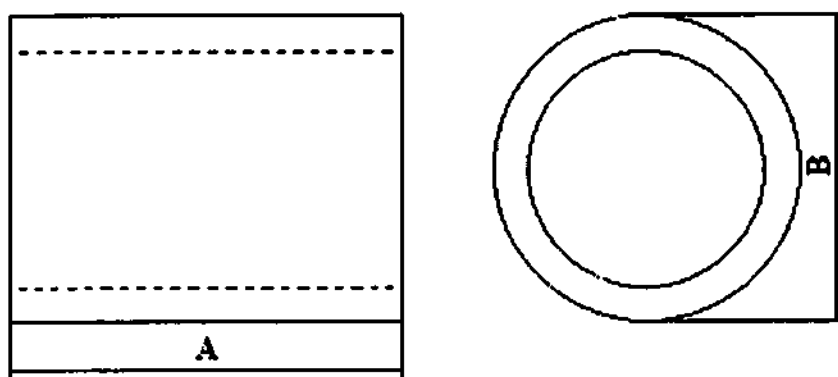


Размер кольца	1/S	2/M	3/L
Размер ноги	35-38	39-42	43-46
Длина А, см	2,5±,1	3,0±0,1	3,5±0,1
Диаметр В, см	1,8±0,1	2,0±0,1	2,2±0,1
Масса нетто, г	6,2±0,1	9,0±0,1	11,6±0,1
Масса брутто, г	12,0±0,1	14,8±0,1	18,0±0,1

Код 548 Силиконовый колпачок для пальца ноги

Предназначен для фиксации пальца стопы и консервативного лечения повреждений мягких тканей пальцев стопы. Представляет собой силиконовую трубку, закрытую куполом с одного конца, которая открытым концом одевается на любой палец стопы,

фиксирует его положение и защищает его от повреждения соседними пальцами и обувью.

Изделие предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одном белом цвете и в одном из 2-х размеров: 1-2/S-M, 3-4/L-XL.

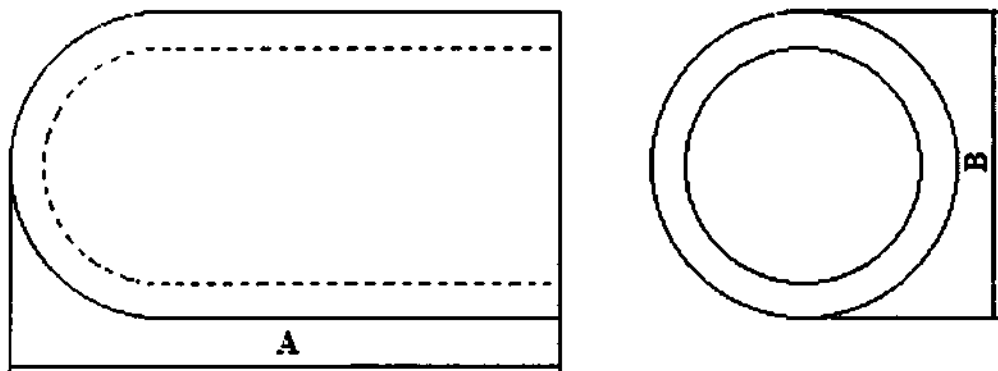


Размер колпачка	1-2/S-M	3-4/L- XL
Размер ноги	35-40	41-46
Длина А, см	4,0±0,1	4,5±0,1
Диаметр В, см	2,5±0,1	2,7±0,1
Масса нетто, г	6,4±0,1	10±0,1
Масса брутто, г	12,4±0,1	16,2±0,1

Код 549 Силиконовая стелька для передней части стопы

Предназначена для поддержки передней части стопы. Представляет собой силиконовую стельку без переднего края и пятки, которая размещается внутри обуви под плюсной. Данная модель стелек подходит для обуви с открытым носком и с открытой пяткой.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одном белом цвете и в одном универсальном размере.

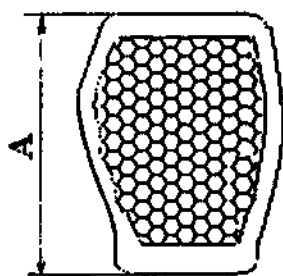


A, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
5,0±0,1	34,6±0,5	49,4±0,5

Код 550 Силиконовая защита для плюснефалангового сустава

Предназначена для консервативного лечения, послеоперационной реабилитации вальгусной деформации первого пальца стопы и для уменьшения болевых ощущений при вальгусной деформации первого пальца стопы. Представляет собой изделие из мягкого силикона, которое располагается вдоль первой плюсневой кости и фиксируется вокруг большого пальца стопы.

Изделие поставляется, предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном универсальном размере.

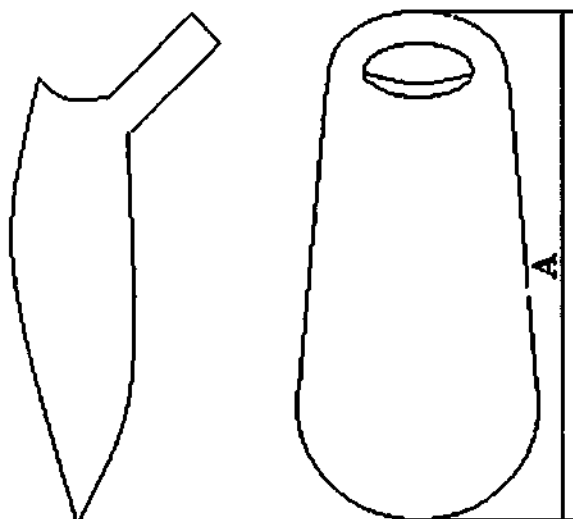


A, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
10±0,2	22,6±0,5	29,0±0,5

Код 551 Силиконовая подушка под плюсневую кость с кольцом

Предназначена для лечения повреждений мягких тканей стопы в плюсневой зоне. Представляет собой тонкую подушечку овальной формы из мягкого силикона, которая располагается под стопой в плюсневой зоне и фиксируется вокруг второго пальца стопы.

Изделие поставляется попарно, предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном универсальном размере.

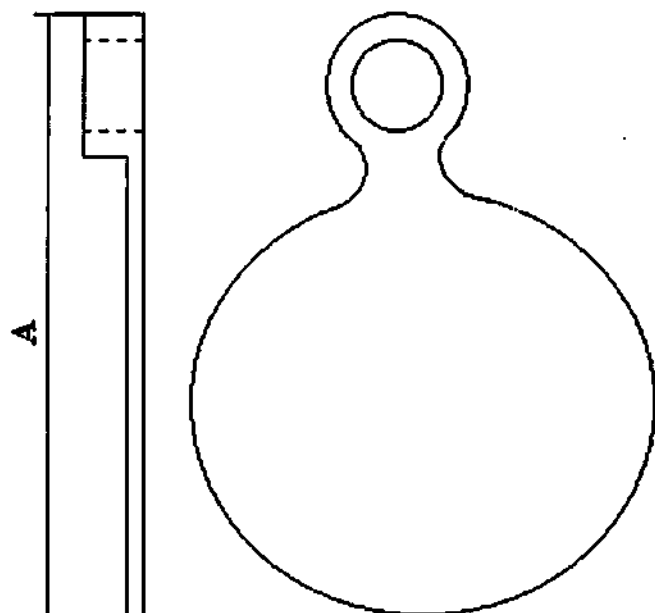


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
10±0,2	41,4±0,5	52,6±0,5

Код 552 Силиконовая подушка под плюсневую кость с разделителем

Предназначена для лечения повреждений мягких тканей стопы в плюсневой зоне. Представляет собой тонкую подушечку овальной формы из мягкого силикона, которая располагается под стопой в плюсневой зоне и фиксируется с помощью межпальцевой перегородки между первым и вторым пальцем стопы.

Изделие поставляется попарно, предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном универсальном размере.

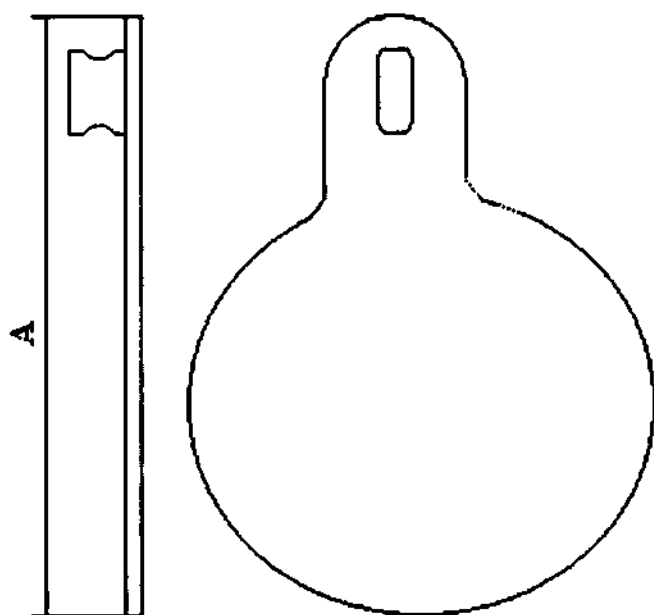


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
10±0,2	43,4±0,5	57,0±0,5

Код 553 Силиконовый пальцевый гребень с петлей

Предназначен для лечения повреждений мягких тканей пальцев стопы и верхней части плюсневой зоны. Представляет собой подушечку гребневидной формы из мягкого силикона, которая располагается под пальцами и фиксируется вокруг второго пальца стопы.

Изделие для правой ноги зеркально симметрично изделию для левой ноги, предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном универсальном размере.

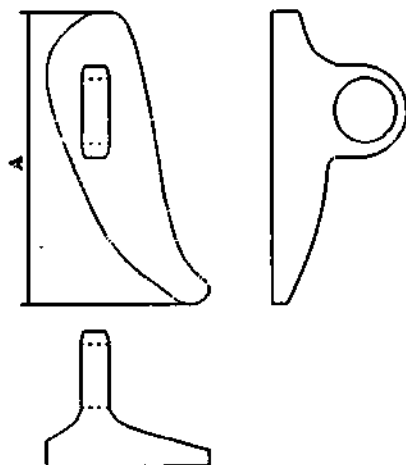


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
6±0,2	10,0±0,1	16,0±0,1

Код 554 Силиконовая подушка под плюсневую кость с разделителем

Предназначена для лечения повреждений мягких тканей стопы в плюсневой зоне.

Представляет собой тонкую подушечку каплевидно-эллиптической формы из мягкого силикона, которая располагается под стопой в плюсневой зоне и фиксируется с помощью межпальцевой перегородки между первым и вторым пальцем стопы.

Изделие поставляется попарно, предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном универсальном размере.

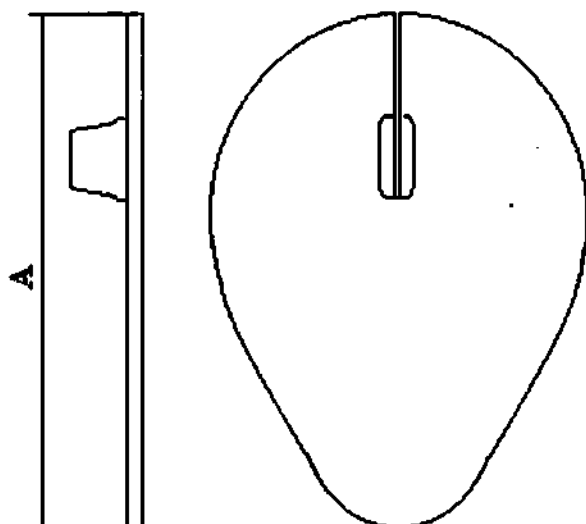


А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
10±0,2	37,6±0,5	51±0,5

Код 582 Клейкая силиконовая медиальная и латеральная накладка

Предназначена для поддержки внешней стороны стопы, пятки и консервативного лечения плоскостопия, пяточной и боковых шпор. Представляет собой силиконовую стельку с тканевым покрытием верхней стороны в виде проекции стопы без зоны арки и первых трех пальцев, которая клеится внутри обуви вдоль внешней стороны ступни.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной ссрой расцветке и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

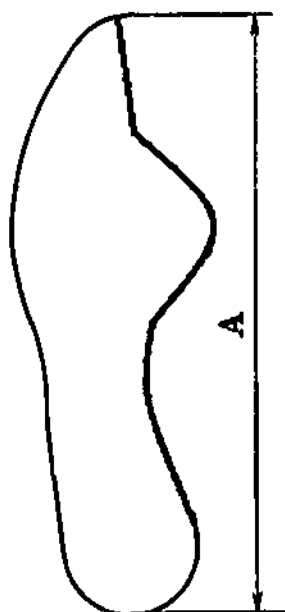


Размер наклейки	1/S	2/M	3/L	4/XL
Размер ноги	35-37	38-40	41-43	44-46
Длина А, см	18,0±0,5	19±0,5	20±0,5	21±0,5
Масса нетто, г	102,2±2	122,2±2	146,6±2	152,8±2
Масса брутто, г	157,6±2	177,6±2	201,8±2	209,2±2

Код 584 Клейкая силиконовая пяточная накладка

Предназначена для поддержки пятки и консервативного лечения пяточной шпоры. Представляет собой силиконовую стельку с тканевым покрытием верхней стороны без средней части и переднего края, которая клеится на внутреннюю стельку обуви в районе пятки. Данная модель стелек подходит для обуви с открытым носком.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной серой расцветке и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

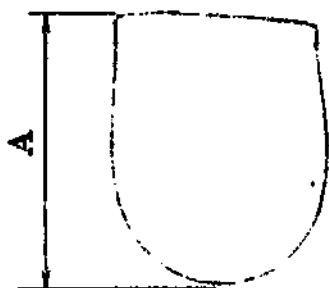


Размер накладки	1/S	2/M	3/L	4/XL
Размер ноги	35-37	38-40	41-43	44-46
Длина А, см	4,5±0,2	5,0±0,2	5,5±0,2	6,0±0,2
Масса нетто, г	54,6±1	67,6±1	89,8±1	94,4±1
Масса, брутто, г	85,4±1	98,8±1	119,0±1	121,2±1

Код 589 Клейкая силиконовая метатарзальная накладка

Предназначена для поддержки плюсневой зоны. Представляет собой силиконовую стельку с тканевым покрытием верхней стороны без переднего края и пяточной зоны, которая клеится на внутреннюю стельку обуви в плюсневой зоне. Данная модель стелек подходит для обуви с открытым носком и открытой пяткой.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной серой расцветке и в одном из 2-х размеров: 1-2/S-M, 3-4/L-XL.

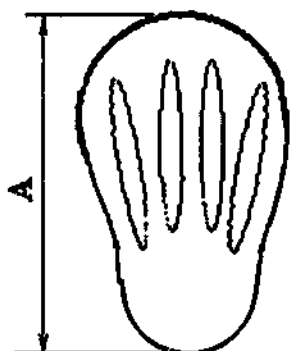


Размер накладки	1-2/S-M	3-4/L-XL
Размер ноги	35-40	41-46

Длина А, см	7,0±0,5	9±0,5
Масса нетто, г	50,0±0,5	63,0±0,5
Масса брутто, г	65,8±0,5	78,8±0,5

Код 590 Клейкая силиконовая продольная поддержка арки

Предназначена для поддержки арки стопы и консервативного лечения плоскостопия. Представляет собой силиконовую стельку с тканевым покрытием верхней стороны в виде проекции арки стопы, которая клеится внутри обуви под аркой. Данная модель стелек подходит для обуви с открытым носком и открытой пяткой.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной серой расцветке и в одном из 2-х размеров: 1-2/S-M, 3-4/L-XL.

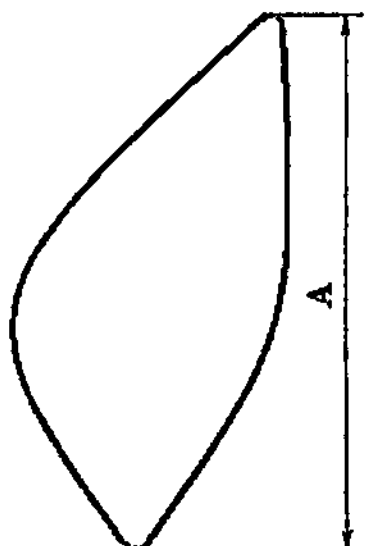


Размер стельки	1-2/S-M	3-4/L-XL
Размер ноги	35-40	41-46
Длина А, см	6,0±0,5	8,0±0,5
Масса нетто, г	44,0±0,5	45,2±0,5
Масса брутто, г	72,8±0,5	74,2±0,5

Код 591 Силиконовая стелька полной длины

Предназначена для поддержки стопы и консервативного лечения пяточной шпоры. Представляет собой силиконовую стельку классической формы, повторяющей форму ступни, которая размещается внутри обуви вместо обычной стельки.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной расцветке- белой с голубыми и фиолетовыми пятнами, и в одном из 2-х размеров: 1-2/S-M, 3-4/L-XL.

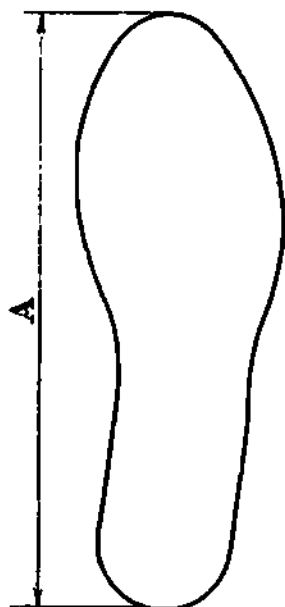


Размер стельки	1-2/S-M	3-4/L-XL
Размер ноги	35-40	41-46
Длина А, см	25,5	29,5
Масса нетто, г	191,0±3	263,6±3
Масса брутто, г	228,2±3	300,4±3

Код 593 Силиконовая стелька 1/2 длины

Предназначена для поддержки арки стопы и консервативного лечения плоскостопия и пяточной шпоры. Представляет собой силиконовую стельку без переднего края с выраженной аркой, которая размещается внутри обуви вместо обычной стельки. Данная модель стелек подходит для обуви с открытым носком.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной расцветке- белой с голубыми и фиолетовыми пятнами, и в одном из 3-х размеров 1/S, 2/M, 3/L.

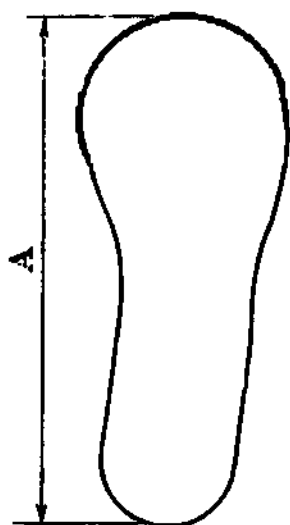


Размер стельки	1/S	2/M	3/L
Размер ноги	35-38	39-42	43-46
Длина А, см	20±0,2	22±0,2	24±0,2
Масса нетто, г	130,0±2	160,6±2	192,6±2
Масса брутто, г	153,6±2	184,8±2	216,8±2

Код 594 Силиконовая стелька под пятку

Предназначена для поддержки пятки и консервативного лечения пяточной шпоры. Представляет собой силиконовую стельку без средней части и переднего края, которая размещается внутри обуви в районе пятки. Данная модель стелек подходит для обуви с открытым носком.

Изделие поставляется попарно, предназначено для людей старше 18 лет, представлено в одной расцветке- белой с голубыми и фиолетовыми пятнами и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

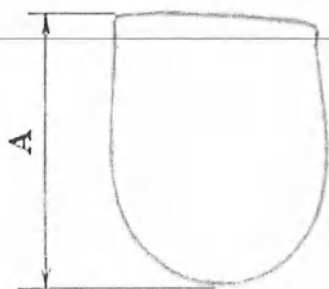


Размер стельки	1/S	2/M	3/L
Размер ноги	35-38	39-42	43-46
Длина А, см	10±0,2	11±,2	12±0,2
Масса нетто, г	61,4±2	92,0±2	128,4±2
Масса брутто, г	77,6±2	108,0±2	144,4±2

Код 814 Стабилизатор лодыжки с воздушной подушкой

Предназначен для фиксации и иммобилизации голеностопного сустава, а также для реабилитации после переломов и операций на голеностопном суставе. Представляет собой систему из трех жестких полиоксиметиленовых пластин - левой, правой и нижней, которые соединяются и фиксируются под пяткой, слева и справа от голеностопного сустава с помощью ремней на застежках-липучках. На внутренней стороне левой и правой части в зоне лодыжки на застежках-липучках крепится воздушная подушка, которая исключает повреждение мягких тканей стабилизатором.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, подходит для левой и правой ноги, поставляется в одном черном цвете и в одном универсальном размере.

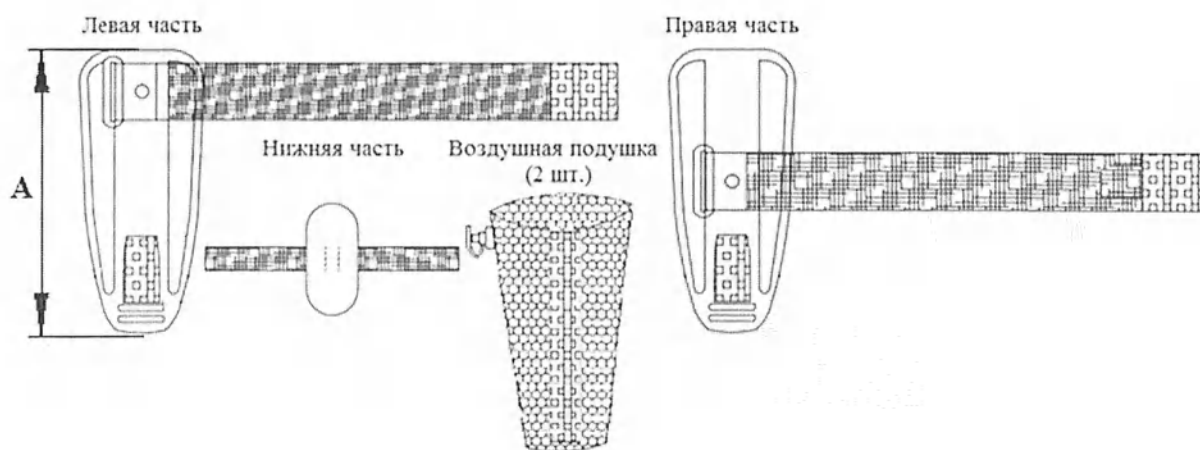

А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
24±0,5	237,0±2	290,0±2

Код 815 Стабилизатор лодыжки с подушкой из губки

Предназначен для фиксации и иммобилизации голеностопного сустава, а также для реабилитации после переломов и операций на голеностопном суставе. Представляет собой систему из трех жестких полиоксиметиленовых пластин- левой, правой и нижней, которые соединяются и фиксируются под пяткой, слева и справа от голеностопного сустава с помощью ремней на застежках-липучках. На внутренней стороне левой и правой части в зоне лодыжки на застежках-липучках крепится поролоновая подушка, обтянутая тканью, которая исключает повреждение мягких тканей стабилизатором.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, подходит для левой и правой ноги, поставляется в одном черном цвете и в одном универсальном размере.




А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
24±0,5	204,0±2	256,0±2

Код 816 Стабилизатор лодыжки с гелевой подушкой

Предназначен для фиксации и иммобилизации голеностопного сустава, а также для реабилитации после переломов и операций на голеностопном суставе. Представляет собой систему из трех жестких полиоксиметиленовых пластин- левой, правой и нижней, которые соединяются и фиксируются под пяткой, слева и справа от голеностопного сустава с помощью ремней на застежках-липучках. На внутренней стороне левой и правой части в зоне лодыжки на застежках-липучках крепится силиконовая гелевая подушка, которая исключает повреждение мягких тканей стабилизатором.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, подходит для левой и правой ноги, поставляется в одном черном цвете и в одном универсальном размере.

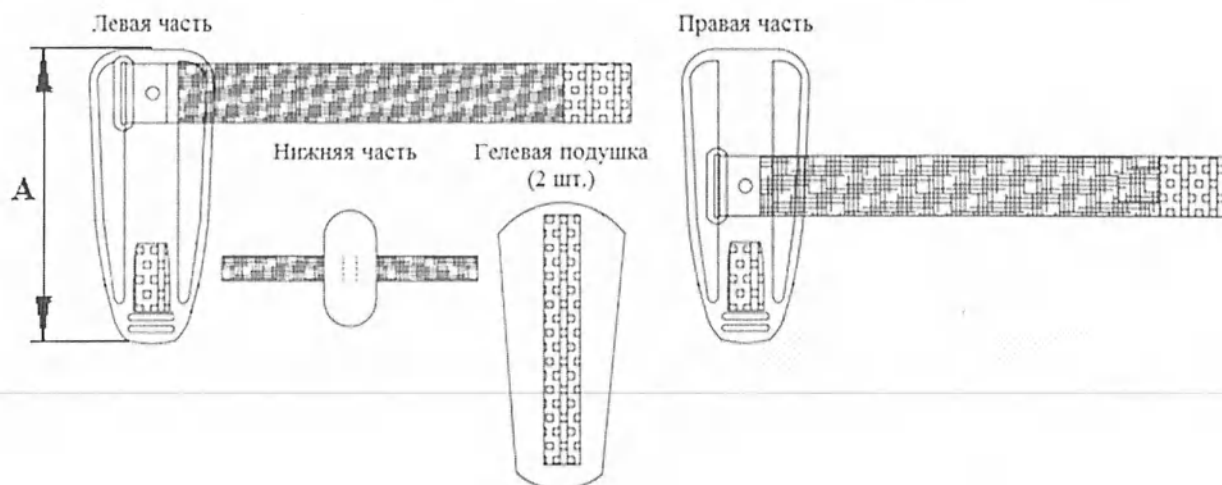

А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
24±0,5	311,0±2	363,0±2


Код 828 Бандаж для стабилизации колена шарнирный

Предназначен для фиксации и иммобилизации коленного сустава. Представляет собой трубку из мягкой неопреновой ткани с круглым вырезом в районе надколенника с двумя вшитыми между основной тканью и подкладкой шарнирами по левую и по правую сторону от выреза, которая одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки, захватывающей нижнюю половину бедра и верхнюю половину голени, и фиксируется четырьмя ремнями на застежках-липучках: 2 ремня располагается друг над другом над коленом, 2 ремня располагается друг над другом под коленным суставом.

С помощью регулируемых шарниров можно зафиксировать нужный угол разведения коленного сустава.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

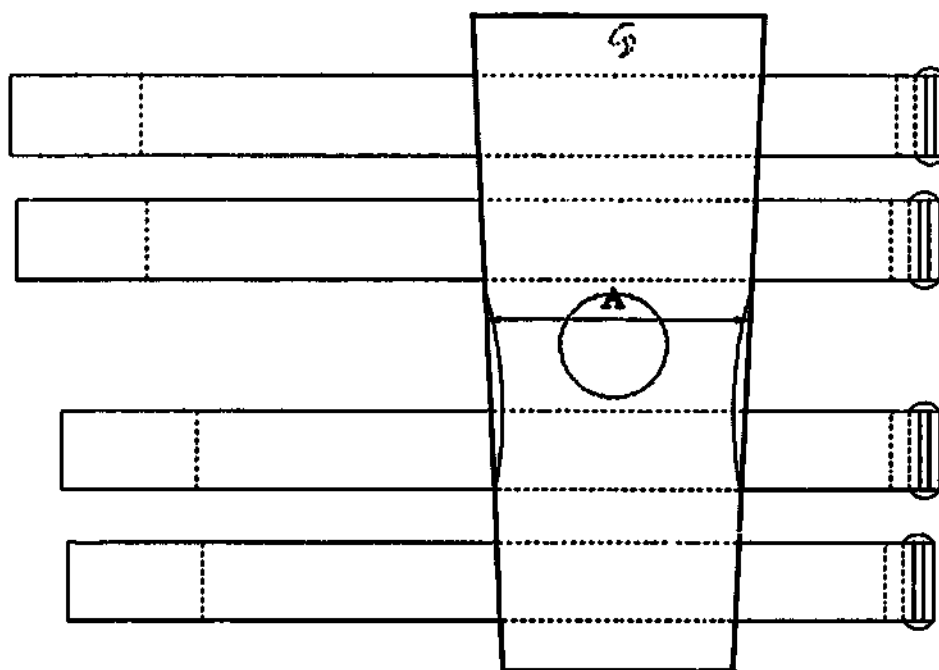

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50
Длина А, см	16±0,5	17±0,5	18±0,5	19±0,5	20±0,5
Масса нетто, г	572,6±10	615,4±10	655,2±10	642,2±10	687,2±10
Масса брутто, г	727,6±10	767,4±10	808,6±10	782,8±10	840,6±10


Код 833 Стабилизатор коленного сустава шарнирный

Предназначен для фиксации и иммобилизации коленного сустава. Представляет собой трубку из мягкой неопреновой ткани с круглым вырезом в районе надколенника с двумя вшитыми между основной тканью и подкладкой шарнирами по левую и по правую сторону от выреза, которая одевается на колено в виде замкнутой эластичной повязки и фиксируется двумя ремнями на застежках-липучках: один располагается над коленом, другой под коленным суставом.

С помощью регулируемых шарниров можно зафиксировать нужный угол разведения коленного сустава.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 5-ти размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

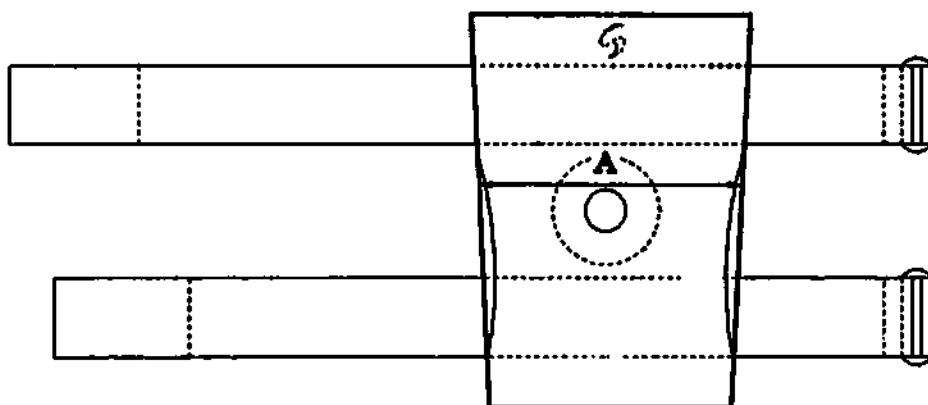


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50
Длина А, см	16±0,5	17±0,5	18±0,5	19±0,5	20±0,5
Масса нетто, г	345,4±3	357,2±3	369,1±3	380,1±3	392,0±3
Масса брутто, г	405,8±3	417,0±3	429,0±3	441,0±3	462,0±3

Код 844 Бандаж на лодыжку с опорой

Предназначен для поддержки и фиксации голеностопного сустава и дополнительной поддержки лодыжки. Представляет собой повязку из мягкой эластичной неопреновой ткани, имеющую форму носка без кончика и без пятки, которая одевается на ступню, как носок. В зоне лодыжки бандаж имеет силиконовую подушечку треугольной формы, выступающую в роли опоры.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном синем цвете и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из длины окружности щиколотки пациента.

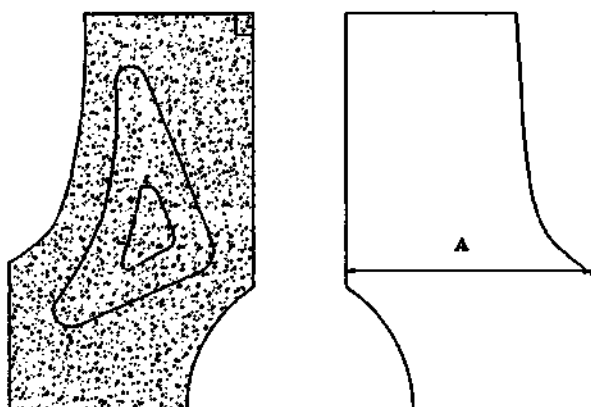


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33
Длина А, см	10±1	12±1	14±1	17±1
Масса нетто, г	102,0±2	104,0±2	108,0±2	110,0±2
Масса брутто, г	123,0±2	133,0±2	143,0±2	153,0±2

Код 858 Бандаж для стабилизации колена шарнирный с регулировкой высоты

Предназначен для поддержки, фиксации и иммобилизации коленного сустава. Представляет собой 2 металлических шарнира с двумя раздвижными металлическими звеньями, фиксирующиеся вдоль ноги от нижней половины бедра до конца верхней половины голени на 4-х ремнях с застежками-липучками- 2 из которых оборачивают бандаж над коленом, 2- под коленным суставом так, чтобы шарниры располагались слева и справа от коленного сустава.

С помощью шарниров можно зафиксировать нужный угол разведения коленного сустава.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной черной расцветке, и в одном универсальном размере.

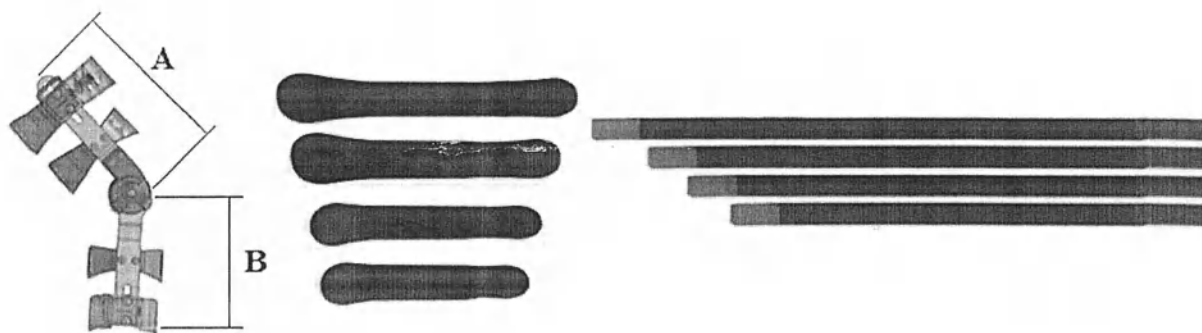

А, см	В, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
34±0,5	34±0,5	1019,0±20	1289,8±20


Код 859 Локтевой ортез ROM

Предназначен для поддержки, фиксации и иммобилизации локтевого сустава. Представляет собой металлический шарнир с двумя раздвижными металлическими звеньями, фиксирующийся вдоль руки от нижней половины плеча до нижней трети

предплечья на 4-х ремнях с застежками-липучками- 2 из которых оборачивают ортез над локтем, 2- под локтевым суставом так, чтобы шарнир располагался на локтевом суставе. С помощью шарнира можно зафиксировать нужный угол разведения локтевого сустава. К ортезу с обоих концов прикреплен регулируемый ремень-подхват на пряжке, который перекидывается через шею.

Изделие для правой руки зеркально симметрично изделию для левой руки.

Изделие предназначено для лиц старше 3-х лет, поставляется в двух расцветках: черной для взрослых и желтой с черным для детей и в одном из двух размеров- универсальном детском или универсальном взрослом.

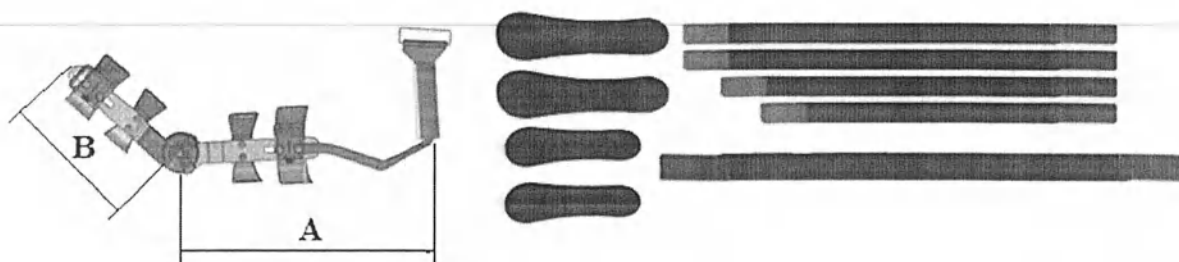


Размер	A, см	B, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
Универсальный детский	28±0,5	20±0,5	401,0±4	574,6±4
Универсальный взрослый	35±0,5	22±0,5	455,0±4	628,6±4

Код 860 Бандаж-каркас при рекурвации коленного сустава

Предназначен для фиксации, иммобилизации и предотвращения излишнего сгибания коленного сустава. Представляет собой металлическую рамку, фиксирующуюся сзади и по бокам от колена на ремнях, расположенных над и под коленным суставом, на фрагмент рамки под коленным суставом закреплена мягкая тканевая подушечка для предотвращения трения.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном черном цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

Размер подбирается исходя из длины окружности колена пациента.

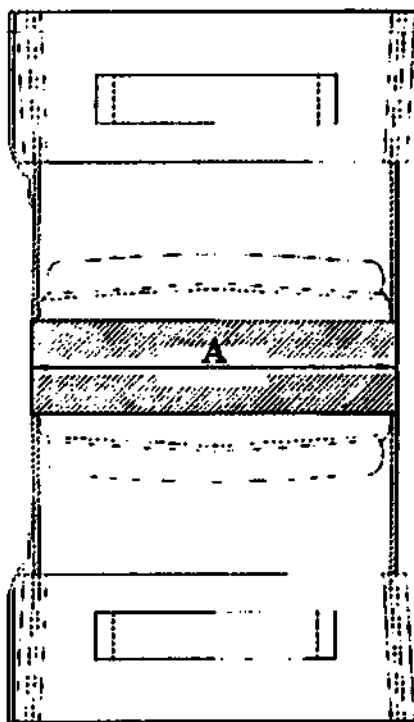


Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42
Длина А, см	10±0,5	14±0,5	18±0,5
Масса нетто, г	221,8±3	250,2±3	278,6±3
Масса брутто, г	254,2±3	297,8±3	340,4±3

Код 864 Устройство защитное на стопу

Предназначен для поддержки и фиксации голеностопного сустава под углом 90°, т-образная часть фиксируется под подошвенной частью устройства для предотвращения поворотных движений щиколотки. Представляет собой пластиковый сапог, который имеет только заднюю часть голенища до верхней трети голени, пяточную и подошвенную часть, и фиксируется на ноге с помощью трех ремней на застежке-липучке.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одном белом цвете и в одном из 3-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L.

Размер подбирается исходя из размера ноги / длины ступни.

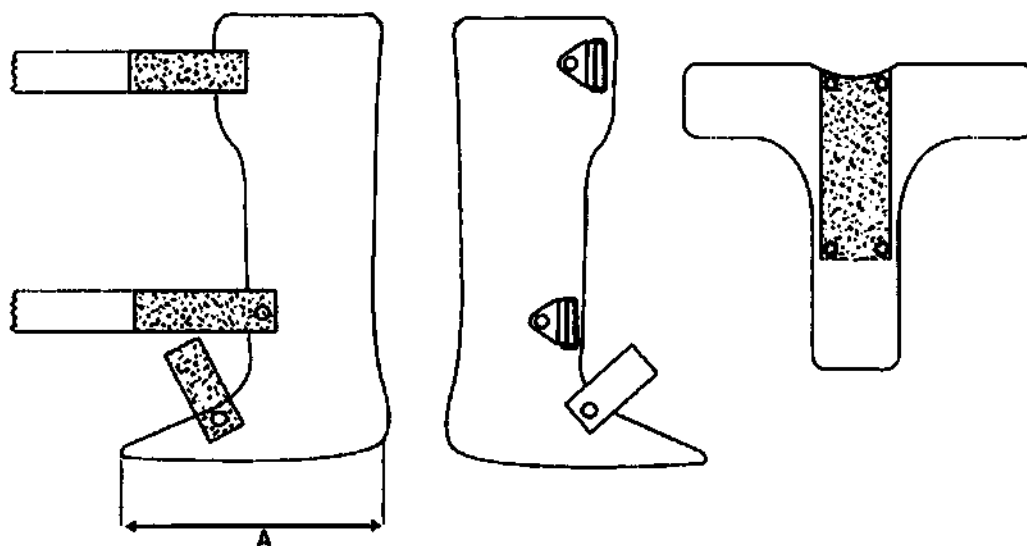

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Размер ноги	36-38	39-41	42-44
Длина А, см	24±1	26±1	28±1
Масса нетто, г	452,0±5	473,0±5	592,0±5
Масса брутто, г	467,0±5	488,0±5	607,0±5


Код 865 Устройство защитное на стопу Reflex АФО

Предназначен для поддержки и фиксации голеностопного сустава под углом 90°. Представляет собой пластиковый сапог, который имеет только заднюю часть голенища до середины голени, пяточную и подошвенную часть, и фиксируется на ноге с помощью двух ремней на застежке-липучке, применяется совместно с любыми видами обуви на плоской подошве.

Изделие для правой ноги зеркально симметрично изделию для левой ноги.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной расцветке- белой с черным и в одном из 4-х размеров: 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL.

Размер подбирается исходя из размера ноги / длины ступни.

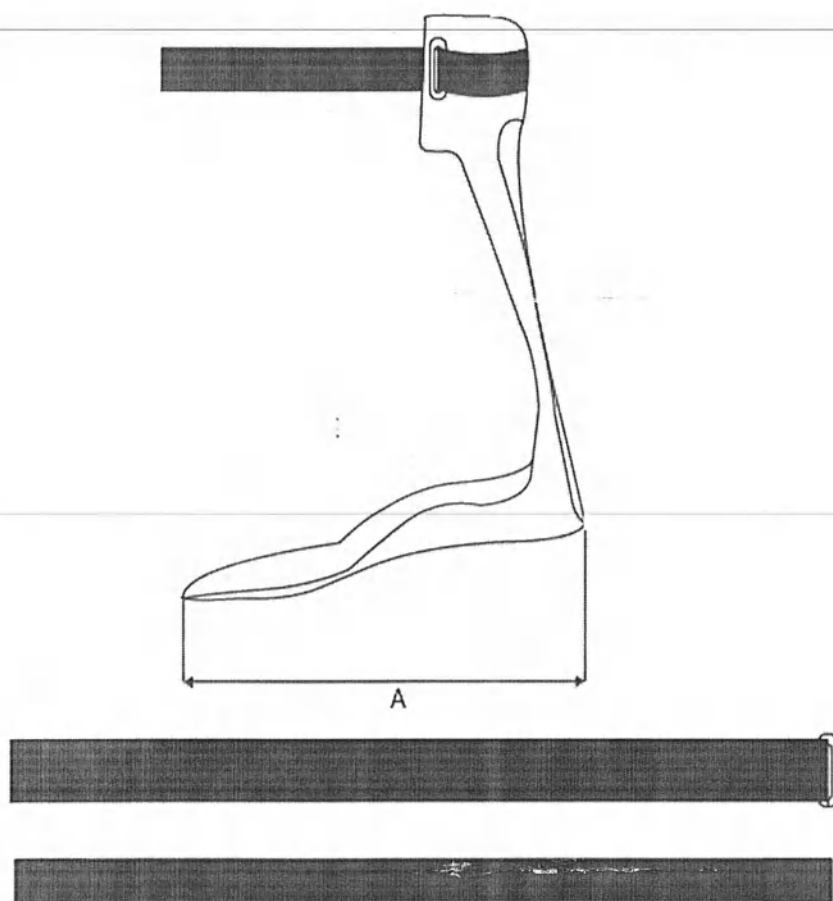


Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Размер ноги	37-38	39-40	41-42	43-44
Длина А, см	25±0,5	26±0,5	27±0,5	28±0,5
Масса нетто, г	97,4±1	118,0±1	141±1	147,4±1
Масса брутто, г	108,2±1	129±1	152,0±1	158,4±1

Код 898 Бандаж для стабилизации коленного сустава шарнирный

Предназначен для поддержки, фиксации и иммобилизации коленного сустава. Представляет собой полотно, выполненное из плотной неопреновой ткани с квадратным вырезом в зоне коленной чашечки и вшитыми между основной тканью и подкладкой шарнирами по левую и по правую сторону от выреза. Полотно одевается на колено в виде эластичной трубчатой повязки и фиксируется с помощью четырех ремней с застежками липучками, 2 из которых оборачивают бандаж над коленом, 2-под коленным суставом.

С помощью шарниров можно зафиксировать нужный угол разведения коленного сустава.

Изделие предназначено для лиц старше 18 лет, поставляется в одной синей расцветке, и в одном универсальном размере.

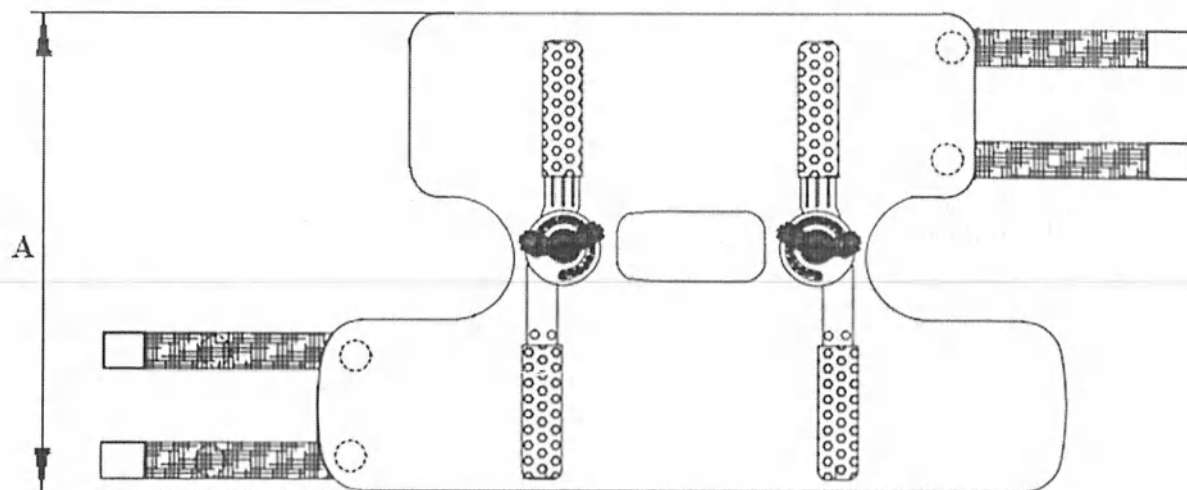

А, см	Масса нетто, г	Масса брутто, г
39±0,5	595,0±10	750,4±10

Материалы изготовления изделий:

Все материалы, используемые для производства всех вариантов исполнения бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого могут быть оценены как биосовместимые с точки зрения требований, представленных в DIN EN ISO 10993.

Таблица №1. Материалы изготовления, контактирующие с телом человека

Деталь изделия	Обозначение материала, марка материала	Производитель	Вид контакта
Варианты исполнения с кодами 400, 975, 977, 979			
Основной материал изделия	Материал: Хлопок 80%; Полиамид 10%; Эластан 10% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый / черный Марка красителя: BLESSED TEXTILES-BG / SW	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами: 331, 332, 333, 334, 335			
Основной материал изделия	Материал: Алюминий 100% Марка материала: 1050A Краситель- отсутствует	KORUMAZ KARDESLER ALUMINYUM, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Пластазот Марка материала: GK-PFB Краситель- белый Марка красителя: Kunyi-WS	Shanghai Gokai Industry, Китай	
Вариант исполнения с кодом 336			
Сплошное покрытие алюминиевого	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- голубой/серый	Wacker Chemie AG, Германия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность

каркаса изделия	Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A-BL / GR		ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Неопрен 100% Марка материала: WST-0015 Краситель- черный Марка красителя: WST-0015-SW	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	
Варианты исполнения с кодами: 406, 408, 410, 412, 415			
Основной материал изделия	Материал: Хлопковый полиэстер (Хлопок 35%, Полиэстер 65%) 44%; Хлопок 18%, Резина 38% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES-BG	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами: 340, 345			
Основной материал изделия	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный / синий Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW / BL	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Варианты исполнения с кодами: 804, 806			
Основной материал изделия	Материал: Акрил 75%, Резина 15%, Полиамид 10% Марка материала Trivialtex-111-EU Краситель белый Марка красителя Trivialtex -111-EU- WS	Trivalex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Вариант исполнения с кодом 805			
Основной материал изделия	Материал: Вискоза 61%;Хлопок 30%, Эластан 7%, Полиамид 2% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- белый Марка красителя: BLESSED TEXTILES-WS	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами: 541, 542, 543, 544			
Основной материал изделия	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый/голубой Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS / BL	Wacker Chemie AG, Германия	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами: 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554			
Основной материал изделия	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS	Wacker Chemie AG, Германия	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами 582, 584, 589, 590			
Основной материал изделия	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- серый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - GR	Wacker Chemie AG, Германия	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 80%; Полиэстер 20% Марка материала BLESSED TEXTILES	BLESSED TEXTILES	

	Краситель серый Марка красителя: BLESSED TEXTILES -GR	LIMITED, Пакистан	
Варианты исполнения с кодами 591, 593, 594			
Основной материал изделия	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый/серый/фиолетовый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS / GR / VI	Wacker Chemie AG, Германия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Вариант исполнения с кодом 560			
Основной материал изделия	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- красный/синий/зеленый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - RT / BL / GN	Wacker Chemie AG, Германия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами 801, 802, 803, 953			
Основной материал изделия	Материал: Полиамид 60%; Эластан 40% Марка материала: Trivialtex Краситель бежевый Марка красителя: Trivialtex -BG	Trivialex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами 474, 475			
Основной материал изделия	Материал: Полиамид 60%; Эластан 40% Марка материала: Trivialtex Краситель черный/серый Марка красителя: Trivialtex -SW / GR	Trivialex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Силиконовая вкладка	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS	Wacker Chemie AG, Германия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами 721, 722, 723, 724, 725			
Основной материал изделия	Материал: Полиамид 60%; Эластан 40% Марка материала: Trivialtex Краситель черный/серый Марка красителя: Trivialtex -SW / GR	Trivialex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами 451, 452, 462			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 60%; Полиамид 20%; Эластан 20% Марка материала: Trivialtex Краситель черный/зеленый Марка красителя: Trivialtex -SW / GR	Trivialex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Варианты исполнения с кодами 453, 455, 456, 458			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 60%; Полиамид 20%; Эластан 20% Марка материала: Trivialtex Краситель черный/зеленый Марка красителя: Trivialtex -SW / GR	Trivialex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Силиконовая вкладка	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A -	Wacker Chemie AG, Германия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.

	WS		
Варианты исполнения с кодами 564, 565			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 60%; Полиамид 20%; Эластан 20% Марка материала: Trivialtex Краситель бежевый Марка красителя: Trivialtex -BG	Trivialex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Силиконовая вкладка	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS	Wacker Chemie AG, Германия	
Варианты исполнения с кодами 460, 465			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 60%; Эластан 40% Марка материала: Trivialtex Краситель черный/зеленый Марка красителя: Trivialtex -SW / GR	Trivialex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Вариант исполнения с кодом 454			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 60%; Полиамид 20%; Эластан 20% Марка материала: Trivialtex Краситель черный/зеленый Марка красителя: Trivialtex -SW / GR	Trivialex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Силиконовая вкладка	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS	Wacker Chemie AG, Германия	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Шарнир	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель синий Марка красителя: Fujian KINGDA POM-BL	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Заклепка шарнира	Материал: Сталь нержавеющая 100% Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Нашивка на текстильную застежку	Материал: Полиамид 100% с красочным покрытием Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	

	Марка покрытия 04SG Краситель красный Марка красителя покрытия: 04SG-RAL 3028		
Варианты исполнения с кодами 820, 822			
Основной материал изделия	Материал: Неопрен 100% Марка материала: Jianbo Краситель- синий Марка красителя: Jianbo-BL	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BG	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Варианты исполнения с кодами 823, 824, 833, 834			
Основной материал изделия	Материал: Неопрен 100% Марка материала: Jianbo Краситель- синий Марка красителя: Jianbo-BL	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES-BG	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель синий Марка красителя: Velcro BL	Velcro GmbH, Германия	
Варианты исполнения с кодами 825, 879			
Основной материал изделия	Материал: Неопрен 100% Марка материала: Jianbo Краситель- синий Марка красителя: Jianbo-BL	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BG	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель синий Марка красителя: Velcro BL	Velcro GmbH, Германия	
Карман для шины	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель темно-синий Марка красителя: Yalcin Tekstil -DBL	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Вариант исполнения с кодом 827			
Основной материал изделия	Материал: Неопрен 100% Марка материала: Jianbo Краситель- синий Марка красителя: Jianbo-BL	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель синий Марка красителя: Velcro BL	Velcro GmbH, Германия	
Люверс	Материал: Сталь нержавеющая 100% Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Лента уплотнительная под люверсы	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель черный	Yalcin Tekstil Boya, Турция	

	Марка красителя: Yalcin Tekstil SW		
Шнурок	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Zhongshan Краситель-черный Марка красителя: Zhongshan- SW	Zhongshan Sanxin Textile Co., Ltd., Китай	
Варианты исполнения с кодами 880, 881, 882, 884, 885, 887, 888, 892, 893, 894, 897			
Основной материал изделия	Материал: Неопрен 100% Марка материала: Jianbo Краситель- синий Марка красителя: Jianbo-BL	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- синий Марка красителя: Yalcin Tekstil -BL	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель синий Марка красителя: Velcro BL	Velcro GmbH, Германия	
Варианты исполнения с кодами 883, 886			
Основной материал изделия	Материал: Неопрен 100% Марка материала: Jianbo Краситель- синий Марка красителя: Jianbo-BL	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- синий Марка красителя: Yalcin Tekstil -BL	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель синий Марка красителя: Velcro BL	Velcro GmbH, Германия	
Силиконовая вкладка	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSiL P7684/60A Краситель- белый / синий Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS / BL	Wacker Chemie AG, Германия	
Варианты исполнения с кодами 844, 849			
Основной материал изделия	Материал: Неопрен 100% Марка материала: Jianbo Краситель- синий Марка красителя: Jianbo-BL	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- синий Марка красителя: Yalcin Tekstil -BL	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Силиконовая вкладка	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS	Wacker Chemie AG, Германия	
Варианты исполнения с кодами 828, 898			
Основной материал изделия	Материал: Неопрен 100% Марка материала: Jianbo Краситель- синий / черный Марка красителя: Jianbo-BL / SW	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES	BLESSED TEXTILES	

	Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES- BG	LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель синий / черный Марка красителя: Velcro-BL / SW	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Шарнир	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% с покрытием Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW Марка покрытия 04SG Краситель белый / оранжевый Марка красителя покрытия: 04SG-RAL 9003 / 2008	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Заклепка шарнира	Материал: Сталь нержавеющая 100% Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Варианты исполнения с кодами 312, 829, 842			
Основной материал изделия	Материал: Неопрен 100% Марка материала: Jianbo Краситель- синий Марка красителя: Jianbo-BL	Dongguan Goodtop Rubber Limited, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель синий Марка красителя: Velcro BL	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Варианты исполнения с кодами 163, 165,			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- бежевый / черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -BG / SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 80%; Полиэстер 20% Марка материала BLESSED TEXTILES Краситель синий Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BL	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro SW	Velcro GmbH, Германия	
Нашивка на текстильную застежку	Материал: Полнамид 100% с красочным покрытием Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель черный Марка красителя: Yalcin Tekstil- SW Марка покрытия 04SG Краситель красный Марка красителя покрытия: 04SG-RAL 3028	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Вариант исполнения с кодом 160			

Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- бежевый / черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -BG / SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 80%; Полиэстер 20% Марка материала BLESSED TEXTILES Краситель синий Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BL	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Силиконовая вкладка	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS	Wacker Chemie AG, Германия	
Вариант исполнения с кодом 760			
Основной материал изделия	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 80%; Полиэстер 20% Марка материала BLESSED TEXTILES Краситель синий Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BL	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Силиконовая вкладка	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS	Wacker Chemie AG, Германия	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: Сталь нержавеющей 100% Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Держатель пряжки	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Заклепка держателя пряжки	Материал: Сталь нержавеющей 100% черная Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Вариант исполнения с кодом 164			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- бежевый / черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -BG / SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 80%; Полиэстер 20% Марка материала BLESSED TEXTILES Краситель синий	BLESSED TEXTILES LIMITED,	

	Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BL	Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro SW	Velcro GmbH, Германия	
Люверс	Материал: Сталь нержавеющей 100% Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Шнурок	Материал: Резина 80%; Полиэстер 20% Марка материала: Zhongshan Краситель-черный Марка красителя: Zhongshan - SW	Zhongshan Sanxin Textile Co., Ltd., Китай	
Варианты исполнения с кодами 303, 313, 320			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- бежевый Марка красителя: Yalcin Tekstil -BG	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель бежевый Марка красителя: Velcro BG	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель бежевый Марка красителя: Fujian KINGDA POM-BG	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Варианты исполнения с кодами 314			
Основной материал изделия	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro SW	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Варианты исполнения с кодами, 305, 306, 307			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 60%; Эластан 40% Марка материала: Trivialtex Краситель бежевый Марка красителя: Trivialtex -BG	Trivialtex-Fibras Sintetias Lda, Португалия	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BG	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель бежевый Марка красителя: Velcro-BG	Velcro GmbH, Германия	
Варианты исполнения с кодами 304, 510			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- бежевый / черный	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительнос

	Марка красителя: Yalcin Tekstil -BG / SW		ть контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BG / SW	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель бежевый / черный Марка красителя: Velcro BG / SW	Velcro GmbH, Германия	
Вариант исполнения с кодом 308			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- бежевый Марка красителя: Yalcin Tekstil -BG	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- белый Марка красителя: BLESSED TEXTILES -WS	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель бежевый Марка красителя: Velcro BG	Velcro GmbH, Германия	
Вариант исполнения с кодом 301			
Основной материал изделия	Материал: Акрил 100% Марка материала: Tianjin GT Краситель- бежевый Марка красителя: Tianjin GT-BG	Tianjin GT New Material Technology Co., Ltd., Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Карман для шнury	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель белый Марка красителя: Yalcin Tekstil -WS	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель бежевый Марка красителя: Velcro-BG	Velcro GmbH, Германия	
Вариант исполнения с кодом 323			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- бежевый Марка красителя: Yalcin Tekstil- BG	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES BG	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель бежевый Марка красителя: Velcro-BG	Velcro GmbH, Германия	
Вариант исполнения с кодом 315			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- черный Марка красителя: Yalcin Tekstil- SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	

	Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW		
Вариант исполнения с кодом 860			
Основной материал изделия	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- черный Марка красителя: BLESSED TEXTILES -SW	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Каркас	Материал: Алюминий 100% с покрытием Марка материала: 1050A Краситель- отсутствует Марка покрытия PE40 Краситель покрытия черный Марка красителя покрытия PE40-RAL 9004	KORUMAZ KARDESLER ALUMINYUM, Турция	
Подколенная подушечка	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Заклепка на ремнях	Материал: Сталь нержавеющая 100% черная Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Варианты исполнения с кодами 858, 859			
Основной материал изделия	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка и ремни	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- черный Марка красителя: BLESSED TEXTILES-SW	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Шарнир	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% с покрытием Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW Марка покрытия 04SG Краситель белый / оранжевый Марка красителя покрытия: 04SG-RAL 9003 / 2008	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Элементы звена шарнира	Материал: Алюминий 100% Марка материала: 1050A Краситель- отсутствует	KORUMAZ KARDESLER ALUMINYUM, Турция	
Элементы звена шарнира	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный / желтый Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW / GE	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Заклепки на ремнях и шарнирах	Материал: Сталь нержавеющая 100% Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware	

		Products Co, Китай	
Варианты исполнения с кодами 302, 302К			
Основной материал изделия	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- синий / белый Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BL / WS	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель синий / белый Марка красителя: Fujian KINGDA POM-BL / WS	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Варианты исполнения с кодами 309, 319			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут..
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- черный Марка красителя: BLESSED TEXTILES -SW	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Нашивка на текстильную застежку	Материал: Полиамид 100% с красочным покрытием Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель черный Марка красителя: Yalcin Tekstil- SW Марка покрытия 04SG Краситель красный Марка красителя покрытия: 04SG-RAL 3028	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Карман для шины	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель черный Марка красителя: Yalcin Tekstil- SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Шнурок	Материал: Резина 80%; Полиэстер 20% Марка материала: Zhongshan Краситель-черный Марка красителя: Zhongshan - SW	Zhongshan Sanxin Textile Co., Ltd., Китай	
Вариант исполнения с кодом 350			
Основной материал изделия	Материал: бутадиен-стирольный каучук 100% Марка материал: Dengyue Краситель черный Марка красителя: Dengyue-SW	GÖKPA ENDÜSTRİYEL SÜNGER SAN.TİC., Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Вариант исполнения с кодом 355			
Основной материал изделия	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут..
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	

Вариант исполнения с кодом 300			
Основной материал изделия	Материал: Полипропилен 100% Марка материал: Dongguan DXBLPP-60 Краситель черный / синий Марка красителя: Dexing DXBLPP-60-SW / BL	Dongguan Yulin Technology Co., Ltd., Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Вариант исполнения с кодом 311			
Основной материал изделия	Материал: Полиэтилен 100% Марка материал: GÖKPA Краситель бежевый Марка красителя: GÖKPA -BG	GÖKPA ENDÜSTRİYEL SÜNGER SAN.TİC., Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 80%; Полиэстер 20% Марка материала BLESSED TEXTILES Краситель бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BG	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный / красный Марка красителя: Velcro-SW / RT	Velcro GmbH, Германия	
Вариант исполнения с кодом 501			
Основной материал изделия	Материал: Алюминий 100% Марка материала: 1050A Краситель- отсутствует	KORUMAZ KARDESLER ALUMINYUM, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Полиуретан Марка материала: JBR-UT012 Краситель- коричневый Марка красителя: JBR-UT012-BR	Tianjin GT New Material Technology Co., Ltd., Китай	
Вариант исполнения с кодом 511			
Основной материал изделия	Материал: Полиамид 100% Марка материала: Yalcin Tekstil 6 Краситель бежевый Марка красителя: Yalcin Tekstil -BG	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Пластзот Марка материала: GK-PFB Краситель- бежевый Марка красителя: Kuyi-BG	Shanghai Gokai Industry, Китай	
Варианты исполнения с кодами 814, 815			
Основной материал изделия	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Покрывные подушечки	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Заклепка на ремнях	Материал: Сталь нержавеющая 100% черная	Dongguan Jingwang	

	Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Hardware Products Co, Китай	
Вариант исполнения с кодом 816			
Основной материал изделия	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель черный Марка красителя: Fujian KINGDA POM-SW	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Заклепка на ремнях	Материал: Сталь нержавеющая 100% черненная Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Силиконовая вкладка	Материал: Силикон 100% Марка материала: ELASTOSIL P7684/60A Краситель- белый Марка красителя: ELASTOSIL P7684/60A - WS	Wacker Chemie AG, Германия	
Вариант исполнения с кодом 854			
Основной материал изделия	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- синий Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BL	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Люверс	Материал: Сталь нержавеющая 100% Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Шнурок	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Zhongshan Краситель- черный Марка красителя: Zhongshan- SW	Zhongshan Sanxin Textile Co., Ltd., Китай	
Вариант исполнения с кодом 863			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- черный Марка красителя: Yalcin Tekstil -SW	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- черный Марка красителя: BLESSED TEXTILES -SW	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Люверсы и крючки	Материал: Сталь нержавеющая 100% Марка материала: SAE1005	Dongguan Jingwang	

	Краситель отсутствует	Hardware Products Co, Китай	
Шнурок	Материал: Резина 80%; Полиэстер 20% Марка материала: Zhongshan Краситель-черный Марка красителя: Zhongshan - SW	Zhongshan Sanxin Textile Co., Ltd., Китай	
Вариант исполнения с кодом 864			
Основной материал изделия	Материал: Полиэтилен 100% Марка материал: GÖKPA Краситель белый Марка красителя: GÖKPA -WS	GÖKPA ENDÜSTRİYEL SÜNGER SAN.TİC., Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES- BG	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель белый Марка красителя: Velcro-WS	Velcro GmbH, Германия	
Пряжки и заклепки	Материал: Сталь нержавеющая 100% Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	
Вариант исполнения с кодом 865			
Основной материал изделия	Материал: Полиэтилен 100% Марка материал: GÖKPA Краситель белый Марка красителя: GÖKPA -WS	GÖKPA ENDÜSTRİYEL SÜNGER SAN.TİC., Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Пластазот Марка материала: GK-PFB Краситель- белый Марка красителя: Kunyi-WS	Shanghai Gokai Industry, Китай	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель черный Марка красителя: Velcro-SW	Velcro GmbH, Германия	
Вариант исполнения с кодом 119			
Основной материал изделия	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- бежевый Марка красителя: Yalcin Tekstil -BG	Yalcin Tekstil Boya, Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Хлопок 100% Марка материала: BLESSED TEXTILES Краситель- бежевый Марка красителя: BLESSED TEXTILES -BG	BLESSED TEXTILES LIMITED, Пакистан	
Стремена	Материал: Полиуретан 100% Марка материала: HJF050 Краситель- бежевый Марка красителя: HJF050-BG	Tianjin GT New Material Technology Co., Ltd., Китай	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель бежевый Марка красителя: Velcro-BG	Velcro GmbH, Германия	

Пряжка	Материал: POM (полноксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель белый Марка красителя: Fujian KINGDA POM-WS	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Вариант исполнения с кодом 188			
Основной материал изделия	Материал: Полиэтилен 100% Марка материала: GÖKPA Краситель белый Марка красителя: GÖKPA -WS	GÖKPA ENDÜSTRİYEL SÜNGER SAN.TİC., Турция	Вид контакта: Кожа; Продолжительность контакта: длительный- от 24 ч до 30 сут.
Подкладка	Материал: Полиуретан 100% Марка материала: HJF050 Краситель- бежевый Марка красителя: HJF050-BG	Tianjin GT New Material Technology Co., Ltd., Китай	
Текстильная застежка	Материал: Полиамид 100% Марка материал: Velcro Краситель бежевый Марка красителя: Velcro-BG	Velcro GmbH, Германия	
Ремни фиксирующие	Материал: Полиэстер 100% Марка материала: Yalcin Tekstil Краситель- бежевый Марка красителя: Yalcin Tekstil- BG	Yalcin Tekstil Boya, Турция	
Пряжка	Материал: POM (полиоксиметилен) 100% Марка материала: Fujian KINGDA POM Краситель белый Марка красителя: Fujian KINGDA POM-WS	Fuzhou Kingda Import And Export Co, Китай	
Отводящая пластина, заклепки и винты	Материал: Сталь нержавеющая 100% Марка материала: SAE1005 Краситель отсутствует	Dongguan Jingwang Hardware Products Co, Китай	

Определение размеров медицинского изделия

Размеры бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого имеют следующие обозначения: универсальный/universal взрослый, универсальный/universal детский, 0/XS, 1/S, 2/M, 3/L, 4/XL, 5/XXL, 6/XXXL, или обозначаются цифрами, также допускается обозначение размера в виде интервала.

Каждому размеру, кроме универсальных, соответствует определенный интервал длины окружности участка конечности, который покрывается бандажом, в сантиметрах- эти значения занесены в таблицу определения размера.

Каждая окружность нижних и верхних конечностей имеет свой буквенный код.

Рисунок №1 Размерные коды окружностей нижних конечностей

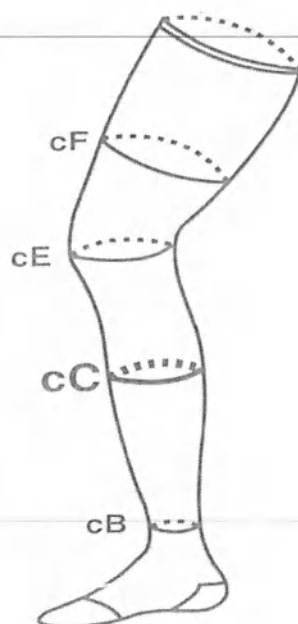


Таблица №2 Расшифровка размерных кодов окружности для определения размера изделия для нижних конечностей

cB	окружность щиколотки, см
cC	окружность голени, см
cE	окружность колена, см
cF	окружность бедра, см

Рисунок №2 Размерные коды окружностей верхних конечностей

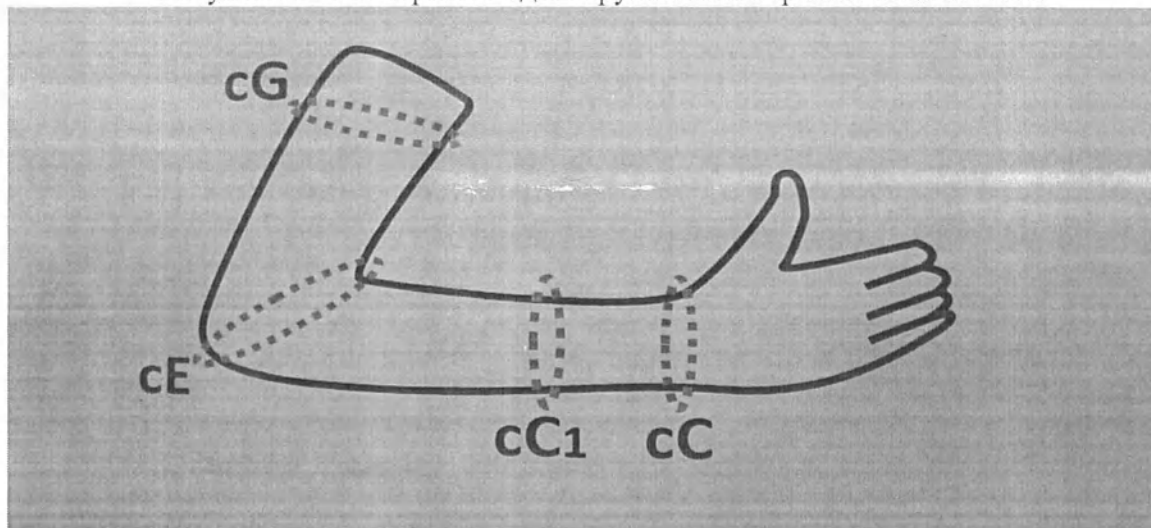


Таблица №3 Расшифровка размерных кодов окружности для определения размера изделия для верхних конечностей

cC	окружность запястья, см
cC1	окружность предплечья, см
cE	окружность локтя, см
cG	окружность плеча, см

Таблица определения размера содержит все возможные размеры для данного варианта исполнения и соответствующие им значения длины окружности участка конечности, покрываемого биндажом в сантиметрах.

Таблица определения размера расположена на потребительской упаковке всех вариантов исполнения биндажей, кроме тех, что имеют универсальный взрослый или универсальный детский размер.

Таблица №4 Таблица определения размера для изделия с кодом 451.

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность бедра, см	34-40	40-46	46-52	52-58

Таблица №5 Таблица определения размера для изделия с кодом 452.

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность голени, см	28-32	32-36	36-40	40-44

Таблица №6 Таблица определения размера для изделий с кодами: 163, 453, 454, 820, 822, 823, 828, 833, 834.

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50

Таблица №7 Таблица определения размера для изделий с кодами: 164, 455, 456, 474, 475, 724, 824, 827, 844.

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность щиколотки, см	15-19	19-23	23-28	28-33

Таблица №8 Таблица определения размера для изделий с кодами: 458, 721, 829, 849.

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
----------------	-----	-----	-----	------

Окружность локтя, см	21-24	24-27	27-30	30-33
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Таблица №9 Таблица определения размера для изделия с кодом 462.

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность запястья, см	12-15	15-18	18-21	21-24

Таблица №10 Таблица определения размера для изделий с кодами: 564, 565.

Размер биндажа	1-2/S-M	3-4/L- XL
Размер ноги	34-40	41-46

Таблица №11 Таблица определения размера для изделия с кодом 722.

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L
Окружность запястья, см	13-16	16-19	19-23

Таблица №12 Таблица определения размера для изделия с кодом 723.

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность голени, см	32-36	36-40	40-44	44-48

Таблица №13 Таблица определения размера для изделия с кодом 725.

Размер биндажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность колена, см	30-34	34-38	38-43	43-48

Таблица №14 Таблица определения размера для изделия с кодом 801.

Размер бандажа	1	2	3	4	5	6	7
Окружность щиколотки, см	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30

Таблица №15 Таблица определения размера для изделия с кодом 802.

Размер бандажа	1	2	3	4	5	6	7
Окружность голени, см	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42	42-45

Таблица №16 Таблица определения размера для изделия с кодом 803.

Размер бандажа	1	2	3	4	5	6	7
Окружность колена, см	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-50

Таблица №17 Таблица определения размера для изделий с кодами: 804, 805, 806.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность колена, см	28-32	32-36	36-40	40-44	44-49

Таблица №18 Таблица определения размера для изделия с кодом 953.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL	6/ XXXL
Окружность запястья, см	14,5-16	16-17,5	17,5-19	19-20,5	20,5-22,5	22,5-24,5

Таблица №19 Таблица определения размера для изделий с кодами: 975, 977, 979.

Размер носков	S-M	L- XL
Размер ноги	36-40	41-45

Таблица №20 Таблица определения размера для изделия с кодом 119.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Окружность талии ребенка, см	25-35	36-46	47-57

Таблица №21 Таблица определения размера для изделий с кодами: 165, 309, 319.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Окружность запястья, см	13-16	16-19	19-22

Таблица №22 Таблица определения размера для изделия с кодом 188.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Окружность талии ребенка, см	25-35	36-46	47-57

Таблица №23 Таблица определения размера для изделия с кодом 300.

Размер бандажа	1/S	3/L
Расстояние от кончика среднего пальца до вершины локтя, см	36-40	45-50

Таблица №24 Таблица определения размера для изделий с кодами: 301, 306, 307.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
Окружность запястья, см	13-15	15-17	17-19	19-21	21-24

Таблица №25 Таблица определения размера для изделий с кодами: 302, 302K.

Размер бандажа	0/XS	1/S	2/M	3/L
Расстояние от кончика среднего	22-32	36-40	40-45	45-50

пальца до вершины локтя, см				
-----------------------------	--	--	--	--

Таблица №26 Таблица определения размера для изделия с кодом 305.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность запястья, см	13-15	15-17	17-19	19-22

Таблица №27 Таблица определения размера для изделия с кодом 314.

Размер бандажа	Маленький	Большой
Диаметр подушки (А), см	20±1	30±1

Таблица №28 Таблица определения размера для изделия с кодом 315.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Расстояние от кончика среднего пальца до вершины локтя, см	36-40	40-45	45-50

Таблица №29 Таблица определения размера для изделий с кодами: 460, 842.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность локтя, см	23-27	27-31	31-34	34-37

Таблица №30 Таблица определения размера для изделия с кодом 465.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Окружность запястья, см	13-15	15-17	17-19	19-21

Таблица №31 Таблица определения размера для изделия с кодом 825.

Размер бандажа	0/XS	1/S	2/M	3/L	4/XL
----------------	------	-----	-----	-----	------

Окружность запястья, см	11-14	13-15	15-17	17-19	19-22
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Таблица №32 Таблица определения размера для изделий с кодами: 854, 863, 864.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Размер ноги	36-38	39-41	42-44

Таблица №33 Таблица определения размера для изделия с кодом 311.

Размер бандажа	S-M	L-XL
Окружность запястья, см	13-19	19-25

Таблица №34 Таблица определения размера для изделия с кодом 320.

Размер бандажа	20	25	30	35	40	50	60	70
Высота бандажа, см	20±1	25±1	30±1	35±1	40±1	50±1	60±1	70±1

Таблица №35 Таблица определения размера для изделий с кодами: 331, 332, 333, 334, 335.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L
Длина пальца, см	6-8	8-10	10-12

Таблица №36 Таблица определения размера для изделия с кодом 336.

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Длина пальца, см	6-8	8-10	10-12	12-13

Таблица №37 Таблица определения размера для изделий с кодами: 340, 345.

Размер бандажа	1-2/S-M	3-4/L-XL
Окружность запястья, см	13-18	18-23

Таблица №38 Таблица определения размера для изделия с кодом 501.

Раз	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
мер	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
стел																											

Размер бандажа	1/S	2/M	3/L	4/XL
Размер ноги	37-38	39-40	41-42	43-44

12. Способ применения медицинского изделия

Перед использованием бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого необходимо проконсультироваться с врачом.

Бандаж одевают на пораженную конечность так, как это изображено на фотографии с потребительской упаковки. Размер бандажа обязательно должен соответствовать длине окружности участка конечности, покрываемого бандажом, в см., указанной в таблице определения размера. При ношении регулируемых бандажей необходимо обеспечивать фиксацию, не перекрывая кровоток.

Длительность и режим ношения бандажа зависит от индивидуальных факторов и определяется врачом.

13. Ограничение применения

Медицинские изделия «VARITEKS» используются по рекомендации врача.

Не рекомендуется носить изделия более 16 часов.

Строго для индивидуального использования.

Носить изделие в соответствии с инструкцией по применению.

Не рекомендуется: использовать изделия размеров, не соответствующих таблице определения размера.

14. Условия применения

Медицинские изделия «VARITEKS» применяются: в условиях повседневного ношения, в условиях стационара.

При использовании медицинского изделия необходимо соблюдать рекомендации врача и не носить их более 16 часов в день. Режим и время ношения должны быть определены врачом.

15. Меры предосторожности при применении

Бандаж предназначен строго для индивидуального использования.

Изделие поставляется в нестерильном виде и стерилизации не подлежит.

Необходимо внимательно осмотреть изделие на предмет отсутствия повреждений содержимого и упаковки, которые могли возникнуть при транспортировке.

В случае обнаружения повреждений, использование изделия не допускается.

Запрещается тянуть и срезать какие-либо нитки на изнаночной стороне изделия, чтобы избежать случайного повреждения изделия.

16. Перечень опасностей, связанных с применением медицинского изделия, анализ рисков

Опасно использование несколькими пациентами. Опасно применение загрязненного изделия.

Процесс управления рисками компании «VARITEKS ORTOPEDI SANAYİ A.Ş.» определяет потенциальные угрозы, связанные с целевым использованием медицинского изделия, процессом разработки и производства. Он включает в себя проверку конструкции изделия, в том числе упаковки, маркировки и инструкций по

применению, на наличие угроз, связанных как с клиническими процедурами, так и с процессом производства. Управление рисками осуществляется в соответствии со стандартом EN ISO 14971.

Угрозы, связанные с медицинским изделием, определяются при анализе угроз и рисков для людей, собственности и окружающей среды.

План управления рисками устанавливает критерии приемлемости риска, обязанности и ответственных исполнителей, контрольные действия, методы осуществления контроля над рисками и проверки эффективности, и методы сбора данных в процессе производства и после его завершения.

В соответствии со стандартом EN ISO 14971, действия по управлению рисками выполняются в процессе производства. Связанные с изделием угрозы определяются путем проведения анализа угроз. В дальнейшем эта информация используется в анализе диагностического дерева отказов, анализе характера и последствий отказов изделия, характера и последствий отказов производства. После завершения проверки выполнения и эффективности мер по управлению рисками оценка допустимости остаточных рисков документируется в Отчете об управлении рисками.

17. Материалы изготовления изделия

Описание материалов, входящих в состав биндажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого и контактирующих с организмом человека подробно представлено в разделе 11 данного документа.

Изделие не содержит в своем составе жидких и газообразных компонентов.

Изделие не содержит латекс.

Изделие не содержит фталаты.

Изделие не содержит в составе веществ, которые могут рассматриваться как лекарственные препараты или фармацевтические субстанции.

Изделие не содержит в составе материалов животного или человеческого происхождения.

При производстве изделия не используются продукты, полученные из тканей животных.

18. Правила эксплуатации, требования безопасности

Перед применением медицинского изделия необходимо проконсультироваться с врачом и внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.

При использовании медицинского изделия необходимо соблюдать рекомендации врача и не носить их более 16 часов в день. Режим и время ношения должны быть определены врачом. Перед использованием любые открытые раны необходимо закрыть стерильной повязкой. Необходимо избежать контакта изделий с жирными мазями, лосьонами для тела или химикатами. Рекомендуется заменять изделия через каждые 6 месяцев ежедневного ношения. Необходимо выбирать размер медицинского изделия в соответствии с таблицей определения размера.

Медицинские изделия «VARITEKS» эксплуатируются при температуре от -20 до +60 °С, относительной влажности от 10 до 100%.

Изделия не должны подвергаться постоянному воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры, пыли и влажности.

19. Требования к охране окружающей среды

Продукты компании «VARITEKS ORTOPEDİ SANAYİ A.Ş.» разработаны и произведены в соответствии с применимыми руководствами по защите окружающей среды.

Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый безопасен и не оказывает влияния на окружающую среду и не имеет специальных требований по защите окружающей среды.

Изделие не генерирует собственную энергию и не поглощает энергию пользователя. Изделие не токсично при комнатной температуре, не выделяет в окружающую среду токсичных веществ, не оказывает вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.

20. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки

Изделие предназначено для многократного использования. Дезинфекции, и предстерилизационной очистке не подлежит.

21. Стерильность, методы стерилизации

Изделие поставляется в нестерильном виде и стерилизации не подлежит.

22. Международные стандарты

Производство и контроль бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого компанией «VARITEKS ORTOPEDİ SANAYİ A.Ş.» осуществляется в соответствии с документированной системой контроля качества, которая отвечает требованиям стандарта EN ISO 13485.

Изделие соответствует следующим международным стандартам:

Таблица №46 международные стандарты.

EN ISO 13485	Соответствие документированной системе контроля качества
EN ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.
EN ISO 14971	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
Директива 93/42/EEC	Директива ЕЕС по медицинским изделиям
ISO 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1 - Основные требования.
Oeko-Tex Standard 100	Международная система тестирования и сертификации изделий из текстильных материалов
TS EN 1041 + A1	Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий
ISO 2859-1	Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества

23. Комплектность поставки

Перед применением проверьте комплектность изделия.

Набор поставки должен включать компоненты:

- медицинское изделие «VARITEKS»;
- потребительскую упаковку, содержащую краткую инструкцию по применению, которая содержит описание изделия, таблицу определения размера, информацию по применению, показания и рекомендации по ношению и стирке.

Другие модификации комплектности поставки данного изделия не допускаются.

24. Упаковка и маркировка медицинского изделия

«Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый» поставляется в количестве 1 шт. / 1 пара вместе с инструкцией по применению в индивидуальной потребительской упаковке- коробке из однослойного картона, размер которой индивидуален для каждого варианта исполнения и зависит от размера изделия в сложенном виде. Бандаж также имеет первичную упаковку-полиэтиленовый пакет.

Изделия с кодами: 953, 975, 977, 979, 501, 511, 541, 542, 543, 544, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 582, 584, 589, 590, 591, 593, 594 являются парными и поставляются по 2 изделия (по 1 паре) в упаковке: одно для правой конечности, второе для левой конечности.

Одна или несколько потребительских упаковок одного или нескольких вариантов исполнения, в соответствии с запросом заказчика, помещаются в транспортную упаковку- коробку из многослойного гофр картона, размеры транспортной упаковки индивидуальны для каждого случая поставки и зависят от того, какие варианты исполнения и в каком количестве были заказаны.

Маркировка «Бандажа медицинского «VARITEKS» растяжимого, регулируемого, нерастяжимого» соответствует Директиве 93/42/ЕЕС и стандарту: ISO 15223-1 (Изделия медицинские – символы, применяемые при маркировке медицинских изделий, этикеток и в сопроводительной документации).

Изделие имеет маркировку на ярлыке, первичной и вторичной упаковке.

Маркировка ярлыка и первичной упаковки содержит код изделия, размер изделия и номер партии.

На ярлыке также могут быть символы:

CODE	Код изделия		Не отбеливать
	Номер партии		Нельзя отжимать и сушить
	Стирать при температуре, указанной на символе		Не гладить
	Химическая чистка запрещена		Ручная стирка
	Не скручивать при отжатии		Сушить растянутым горизонтально

Маркировка первичной упаковки наносится на бумажную самоклеющуюся этикетку, которая наклеивается на первичную упаковку- полиэтиленовый пакет.

Потребительская и транспортная упаковка также имеют маркировку.

В маркировке потребительской и транспортной упаковки могут присутствовать символы:

	Наименование, адрес производителя		Дата производства в формате ГГГГ/ММ/ДД
	Номер партии		Артикул
	Срок годности в формате ГГГГ/ММ/ДД		Беречь от влаги
	Обратитесь к инструкции по применению		Защищать от солнечного света
	По назначению врача		Количество изделий в упаковке
	Упаковку утилизировать с бытовыми отходами		Упаковка пригодна для последующей переработки
	Соответствие европейским стандартам		

Макет этикетки для потребительской упаковки:

 	  «Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый»: группа, код, размер, цвет, правый/левый/универсальный Количество изделий в упаковке:  «VARITEKS ORTOPEDI SANAYİ A.Ş. / ВАРИТЭКС ОРТОПЕДИ САНАЙИ А.С.», Турция Maltepe Mah. Aile Bahçe Sok. Litros Yolu No. 10, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey Уполномоченный представитель в РФ: ООО "Руском ВТ" РФ, 125493, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.17, корпус 2, кв. 266 Тел.: +7-985-462-57-45 Регистрационное удостоверение: _____       
--	---

--	--

Макет этикетки для транспортной упаковки:

Код заказчика: Номер заказа:				
REF	LOT	«Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый»: код, размер, цвет, правый/левый/универсальный	РУ №	Количество упаковок

 «VARITEKS ORTOPEDI SANAYİ A.Ş. / ВАРИТЕКС ОРТОПЕДИ САНАЙИ А.С.»,
Турция
Maltepe Mah. Aile Bahçe Sok. Litros Yolu No. 10, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО "Руском ВТ"
РФ, 125493, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.17, корпус 2, кв. 266
Тел.: +7-985-462-57-45







Перед применением убедитесь в целостности упаковки. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. При обнаружении повреждений не используйте изделие и верните его в место продажи.

Материалы изготовления упаковки:

Таблица №47. «Материалы изготовления упаковки»

Первичная упаковка (внутренний пакет): полиэтилен
Потребительская упаковка (коробка): картон однослойный

Размеры упаковок:

Размер первичной и потребительской упаковки индивидуален для каждого кода и зависит от размера изделия в сложенном виде.

Таблица №48. «Масса изделия по кодам».

Код изделия	Наименование изделия	Размер	Масса Нетто / Брутто, г.
350	Устройство для реабилитации кисти	универсальный/universal	24,8±0,5 / 44,8±0,5
355	Комплект для реабилитации кисти	универсальный/universal	54,0±0,5 / 74,0±0,5
400	Трубчатый бандаж в рулоне	универсальный/universal	487,0±10,0 / 569,0±10,0
406	Эластичный бинт	6,0±0,5 x 200±0,5 , см	32,0±0,5 / 43,6±0,5
408	Эластичный бинт	8,0±0,5 x 200±0,5 , см	40,2±0,5 / 54,4±0,5
410	Эластичный бинт	10,0±0,5 x 200±0,5 , см	56,6±0,5 / 70,6±0,5
412	Эластичный бинт	12,0±0,5 x 200±0,5 , см	70,2±0,5 / 85,4±0,5
415	Эластичный бинт	15,0±0,5 x 200±0,5 , см	77,4±0,5 / 94,4±0,5
451	Бандаж на бедро трикотажный гибкий	1/S	155,1±2,0 / 205,1±2,0
		2/M	162,2±2,0 / 212,2±2,0
		3/L	175,3±2,0 / 225,3±2,0
		4/XL	178,1±2,0 / 228,1±2,0
452	Бандаж на голень трикотажный гибкий	1/S	125,4±2,0 / 175,4±2,0
		2/M	132,3±2,0 / 182,3±2,0
		3/L	144,1±2,0 / 194,1±2,0
		4/XL	154,2±2,0 / 204,2±2,0
453	Код 453 Бандаж на колено трикотажный гибкий	1/S	136,2±2,0 / 185,0±2,0
		2/M	141,2±2,0 / 189,8±2,0
		3/L	155,2±2,0 / 204,4±2,0
		4/XL	157,4±2,0 / 208,0±2,0
		5/XXL	165,0±2,0 / 214,0±2,0
455	Бандаж для поддержки ахиллова сухожилия трикотажный	1/S	119,0±2,0 / 140,0±2,0
		2/M	145,0±2,0 / 167,0±2,0
		3/L	150,0±2,0 / 170,0±2,0

		4/XL	207,0±2,0 / 228,0±2,0
456	Бандаж для поддержки лодыжки трикотажный	1/S	64,0±1,0 / 80,0±1,0
		2/M	65,0±1,0 / 85,0±1,0
		3/L	83,0±1,0 / 103,0±1,0
		4/XL	97,0±1,0 / 115,0±1,0
458	Бандаж для локтевого сустава трикотажный	1/S	69,0±1,0 / 104,0±1,0
		2/M	73,0±1,0 / 105,0±1,0
		3/L	85,0±1,0 / 117,0±1,0
		4/XL	89,0±1,0 / 120,0±1,0
462	Бандаж для поддержки запястья и пясти	1/S	23,0±0,2 / 39,0±0,2
		2/M	25,0±0,2 / 41,0±0,2
		3/L	27,0±0,2 / 43,0±0,2
		4/XL	29,0±0,2 / 45,0±0,2
474	Бандаж при подошвенном фасците с силиконовой поддержкой пятки	1/S	59,0±1,0 / 75,0±1,0
		2/M	61,6±1,0 / 79,5±1,0
		3/L	72,0±1,0 / 93,0±1,0
		4/XL	76,0±1,0 / 97,0±1,0
475	Бандаж парный при подошвенном фасците с силиконовой поддержкой пятки	1/S	118,0±2,0 / 134,0±2,0
		2/M	123,0±2,0 / 141,0±2,0
		3/L	144,0±2,0 / 165,0±2,0
		4/XL	150,0±2,0 / 185,0±2,0
560	Силиконовый мяч для реабилитации кисти, цвет: красный; жесткий	универсальный/universal	65,2±1,0 / 79,2±1,0
560	Силиконовый мяч для реабилитации кисти, цвет: синий; средней жесткости	универсальный/universal	65,2±1,0 / 79,2±1,0
560	Силиконовый мяч для реабилитации кисти, цвет: зеленый; мягкий	универсальный/universal	65,2±1,0 / 79,2±1,0

564	Бандаж плюсневый	1-2 / S-M	32,4±0,5 / 40,2±0,5
		3-4 / L- XL	43,4±0,5 / 51,0±0,5
565	Бандаж при бурсите большого пальца стопы	1-2 / S-M	20,8±0,5 / 29,0±0,5
		3-4 / L- XL	26,6±0,5 / 34,4±0,5
721	Бандаж для поддержки локтя	1/S	15,0±0,2 / 36,4±0,2
		2/M	19,0±0,2 / 38,7±0,2
		3/L	22,0±0,2 / 40,0±0,2
		4/XL	26,0±0,2 / 42,4±0,2
722	Бандаж для поддержки запястья и большого пальца руки	1/S	12,0±0,2 / 28,0±0,2
		2/M	14,0±0,2 / 30,0±0,2
		3/L	15,0±0,2 / 32,0±0,2
723	Бандаж для поддержки икры	1/S	15,0±0,2 / 30,0±0,2
		2/M	17,0±0,2 / 33,0±0,2
		3/L	18,0±0,2 / 34,0±0,2
		4/XL	20,0±0,2 / 35,0±0,2
724	Бандаж для поддержки щиколотки	1/S	23,6±0,2 / 41,2±0,2
		2/M	25,8±0,2 / 42,2±0,2
		3/L	28,4±0,2 / 47,0±0,2
		4/XL	34,4±0,2 / 51,0±0,2
725	Бандаж для поддержки колена	1/S	37,8±0,2 / 54,0±0,2
		2/M	39,3±0,2 / 56,0±0,2
		3/L	42,6±0,2 / 58,8±0,2
		4/XL	45,0±0,2 / 61,8±0,2
801	Эластичный бандаж на голеностоп	1	50,6±0,5 / 71,8±0,5
		2	52,2±0,5 / 73,4±0,5
		3	54,3±0,5 /

			75,5±0,5
		4	54,9±0,5 / 76,1±0,5
		5	56,6±0,5 / 77,6±0,5
		6	57,1±0,5 / 78,3±0,5
		7	59,4±0,5 / 80,4±0,5
802	Эластичный бандаж на голень	1	48,5±0,5 / 70,0±0,5
		2	49,8±0,5 / 71,9±0,5
		3	47,8±0,5 / 69,5±0,5
		4	52,2±0,5 / 73,2±0,5
		5	59,8±0,5 / 80,8±0,5
		6	62,4±0,5 / 83,4±0,5
		7	66,2±0,5 / 87,0±0,5
803	Эластичный бандаж на колено	1	66,0±0,5 / 87,0±0,5
		2	67,7±0,5 / 88,7±0,5
		3	69,3±0,5 / 90,3±0,5
		4	70,4±0,5 / 91,5±0,5
		5	72,3±0,5 / 93,3±0,5
		6	74,2±0,5 / 95,2±0,5
		7	75,0±0,5 / 94,1±0,5
804	Бандаж на колено	1/S	52,4±0,5 / 86,2±0,5
		2/M	55,0±0,5 / 88,8±0,5
		3/L	57,4±0,5 / 90,0±0,5
		4/XL	60,4±0,5 / 94,0±0,5
		5/XXL	65,4±0,5 / 97,4±0,5
805	Бандаж на колено мягкий	1/S	51,8±0,5 / 90,1±0,5
		2/M	58,4±0,5 / 97,0±0,5

		3/L	64,8±0,5 / 104,2±0,5
		4/XL	67,0±0,5 / 106,4±0,5
		5/XXL	75,4±0,5 / 109,3±0,5
806	Бандаж на колено длинный	1/S	71,4±0,5 / 104,4±0,5
		2/M	72,6±0,5 / 105,2±0,5
		3/L	73,4±0,5 / 106,6±0,5
		4/XL	74,0±0,5 / 107,2±0,5
		5/XXL	82,0±0,5 / 115,6±0,5
820	Бандаж на колено закрытый	1/S	143,6±2,0 / 209,0±2,0
		2/M	149,4±2,0 / 215,0±2,0
		3/L	164,4±2,0 / 225,2±2,0
		4/XL	193,4±2,0 / 254,4±2,0
		5/XXL	194,2±2,0 / 261,0±2,0
822	Бандаж на колено с поддержкой надколенной чашечки	1/S	142,4±2,0 / 202,6±2,0
		2/M	155,6±2,0 / 216,2±2,0
		3/L	168,9±2,0 / 230,5±2,0
		4/XL	180,6±2,0 / 235,6±2,0
		5/XXL	224,2±2,0 / 283,6±2,0
849	Бандаж для локтевого сустава с силиконом	1/S	96,8±1,0 / 148,6±1,0
		2/M	103,4±1,0 / 152,8±1,0
		3/L	107,2±1,0 / 159,3±1,0
		4/XL	112,6±1,0 / 162,1±1,0
953	Бандаж для поддержки запястья и пальцев руки	1/S	28,6±0,5 / 49,8±0,5
		2/M	30,4±0,5 / 51,8±0,5
		3/L	30,4±0,5 / 51,2±0,5
		4/XL	37,8±0,5 /

			58,6±0,5
		5/XXL	45,2±0,5 / 66,0±0,5
		6/XXXL	52,6±0,5 / 73,4±0,5
975	Носки эластичные	36-40/S-M	33,0±0,2 / 49,3±0,2
		40-45/L-XL	38,0±0,2 / 53,5±0,2
977	Носки по щиколотку эластичные	36-40/S-M	30,6±0,2 / 45,8±0,2
		40-45/L-XL	31,4±0,2 / 46,9±0,2
979	Носки высокие эластичные	36-40/S-M	28,6±0,2 / 43,8±0,2
		40-45/L-XL	32,0±0,2 / 47,2±0,2
119	Стремена Павлика	1/S	92,0±1,0 / 139,0±1,0
		2/M	97,8±1,0 / 145,0±1,0
		3/L	107,0±1,0 / 150,0±1,0
160	Бандаж эпикондилитный ТХ	универсальный/universal	51,5±0,5 / 72,5±0,5
163	Бандаж на колено с гибкими спицами ТХ	1/S	250,8±3,0 / 321,0±3,0
		2/M	257,4±3,0 / 329,2±3,0
		3/L	267,8±3,0 / 336,8±3,0
		4/XL	275,7±3,0 / 348,1±3,0
		5/XXL	281,9±3,0 / 359,0±3,0
164	Бандаж на лодыжку с опорой ТХ	1/S	130,0±2,0 / 172,0±2,0
		2/M	134,0±2,0 / 176,0±2,0
		3/L	138,0±2,0 / 182,0±2,0
		4/XL	141,0±2,0 / 184,0±2,0
165	Бандаж-шина на запястье ТХ	1/S	103,0±1,0 / 135,4±1,0
		2/M	112,4±1,0 / 145,2±1,0
		3/L	116,8±1,0 / 148,6±1,0
188	Отводящий корсет	1/S	201,6±3,0 / 229,4±3,0

		2/M	240,5±3,0 / 270,6±3,0
		3/L	302,4±3,0 / 331,4±3,0
300	Бандаж-косынка для руки	1/S	420,0±5,0 / 106,6±5,0
		3/L	76,8±5,0 / 107,5±5,0
301	Бандаж-шина на запястье	1/S	75,2±1,0 / 106,6±1,0
		2/M	76,8±1,0 / 105,2±1,0
		3/L	79,6±1,0 / 111,4±1,0
		4/XL	82,6±1,0 / 113,2±1,0
		5/XXL	87,8±1,0 / 116,0±1,0
302	Бандаж-косынка для руки	0/XS	42,0±0,5 / 67,2±0,5
		1/S	65,8±0,5 / 90,0±0,5
		2/M	77,6±0,5 / 105,23±0,5
		3/L	86,4±0,5 / 114,4±0,5
302K	Бандаж-косынка для руки с ремнем	0/XS	67,2±0,5 / 82,4±0,5
		1/S	101,2±0,5 / 126,6±0,5
		2/M	111,6±0,5 / 141,6±0,5
		3/L	117,0±0,5 / 146,6±0,5
303	Бандаж-косынка для руки губчатый	универсальный/universal: детский	107,8±1,0 / 125,0±1,0
		универсальный/universal: взрослый	164,4±1,0 / 192,0±1,0
304	Бандаж, поддерживающий плечевой сустав (Вельпо)	универсальный/universal: детский	186,6±3,0 / 276,4±3,0
		универсальный/universal: взрослый	275,0±3,0 / 368,0±3,0
305	Бандаж-шина большого пальца руки	1/S	40,6±0,5 / 74,4±0,5
		2/M	41,0±0,5 / 78,8±0,5
		3/L	42,3±0,5 / 81,6±0,5
		4/XL	45,7±0,5 / 83,7±0,5
306	Бандаж-шина с поддержкой	1/S	96,2±1,0 /

	большого пальца руки		130,2±1,0
		2/M	98,0±1,0 / 133,2±1,0
		3/L	106,6±1,0 / 141,6±1,0
		4/XL	115,3±1,0 / 148,4±1,0
		5/XXL	119,0±1,0 / 153,6±1,0
307	Бандаж-шина на запястье эластичный	1/S	76,0±1,0 / 110,4±1,0
		2/M	79,8±1,0 / 113,6±1,0
		3/L	86,2±1,0 / 120,2±1,0
		4/XL	88,2±1,0 / 120,2±1,0
		5/XXL	94,4±1,0 / 128,4±1,0
308	Бандаж-шина на запястье ночной	универсальный/universal	107,8±1,0 / 125,6±1,0
309	Бандаж эластичный на запястье	1/S	83,2,0 / 120,8±1,0
		2/M	89,0±1,0 / 122,2±1,0
		3/L	90,4±1,0 / 123,6±1,0
312	Бандаж-косынка для руки из неопрена	универсальный/universal	189,0±2,0 / 228,6±2,0
313	Бандаж-косынка для руки активный	универсальный/universal	465,8±5,0 / 511,6±5,0
314	Бандаж-косынка для руки активный с воздушной подушкой	маленьком/small	545,2±5,0 / 689,2±5,0
		большом/big	561,8±5,0 / 694,8±5,0
315	Бандаж-косынка для руки эластичный	1/S	66,8±1,0 / 96,6±1,0
		2/M	75,2±1,0 / 105,0±1,0
		3/L	79,8±1,0 / 109,6±1,0
319	Бандаж эластичный с поддержкой большого пальца руки	1/S	112,6±1,0 / 146,2±1,0
		2/M	114,8±1,0 / 148,2±1,0
		3/L	117,6±1,0 / 150,8±1,0
323	Повязка для руки практичная	универсальный/universal	57,2±0,5 / 86,0±0,5

460	Бандаж для плечевого сустава вязанный	1/S	94,0±1,0 / 133,0±1,0
		2/M	99,0±1,0 / 138,0±1,0
		3/L	105,0±1,0 / 145,0±1,0
		4/XL	112,0±1,0 / 151,0±1,0
465	Бандаж-шина на запястье эластичный вязанный	1/S	76,0±1,0 / 110,4±1,0
		2/M	79,8±1,0 / 113,4±1,0
		3/L	86,2±1,0 / 120,2±1,0
		4/XL	88,2±1,0 / 122,2±1,0
510	Бандаж-шина ночная мягкая для большого пальца ноги	универсальный/universal	82,4±1,0 / 112,4±1,0
511	Бандаж-шина ночная для большого пальца ноги	универсальный/universal	40,4±0,5 / 71,0±0,5
760	Бандаж эпикондилитный	универсальный/universal	66,0±1,0 / 89,0±1,0
823	Бандаж на колено со спиральными стержнями	1/S	241,0±3,0 / 300,6±3,0
		2/M	251,3±3,0 / 315,6±3,0
		3/L	271,4±3,0 / 331,4±3,0
		4/XL	287,0±3,0 / 366,4±3,0
		5/XXL	295,0±3,0 / 360,8±3,0
824	Бандаж на лодыжку	1/S	73,0±1,0 / 122,5±1,0
		2/M	95,0±1,0 / 135,0±1,0
		3/L	101,0±1,0 / 144,0±1,0
		4/XL	107,0±1,0 / 157,0±1,0
825	Бандаж на запястье	0/XS	44,0±1,0 / 78,6±1,0
		1/S	84,2±1,0 / 116,8±1,0
		2/M	96,2±1,0 / 127,6±1,0
		3/L	108,2±1,0 / 138,4±1,0

		4/XL	116,6±1,0 / 148,0±1,0
827	Бандаж на лодыжку со спиральными ребрами	1/S	117,0±1,0 / 166,0±1,0
		2/M	130,0±1,0 / 173,5±1,0
		3/L	139,0±1,0 / 188,0±1,0
		4/XL	160,0±1,0 / 210,0±1,0
829	Бандаж для локтевого сустава	1/S	67,0±1,0 / 115,0±1,0
		2/M	78,0±1,0 / 127,0±1,0
		3/L	92,0±1,0 / 141,0±1,0
		4/XL	105,0±1,0 / 154,0±1,0
834	Бандаж на колено для перекрестных связок	1/S	310,8±3,0 / 382,4±3,0
		2/M	324,3±3,0 / 396,2±3,0
		3/L	342,0±3,0 / 410,0±3,0
		4/XL	353,4±3,0 / 424,0±3,0
		5/XXL	361,2±3,0 / 437,2±3,0
842	Бандаж плечевого сустава	1/S	130,0±2,0 / 175,0±2,0
		2/M	138,0±2,0 / 182,0±2,0
		3/L	155,0±2,0 / 197,0±2,0
		4/XL	175,0±2,0 / 227,0±2,0
854	Бандаж голеностопного сустава со шнуровкой	1/S	149,0±2,0 / 193,0±2,0
		2/M	167,0±2,0 / 210,0±2,0
		3/L	175,0±2,0 / 215,0±2,0
863	Бандаж при падении стопы	1/S	64,0±1,0 / 88,0±1,0
		2/M	72,0±1,0 / 94,0±1,0
		3/L	80,0±1,0 / 100,0±1,0

879	Бандаж на запястье	универсальный/universal	111,6±2,0 / 145,4±2,0
880	Бандаж большого пальца руки	универсальный/universal	43,6±0,5 / 66,0±0,5
881	Бандаж на запястье	универсальный/universal	26,8±0,2 / 48,4±0,2
882	Бандаж на запястье с фиксатором	универсальный/universal: детский	33,0±0,5 / 55,0±0,5
		универсальный/universal: взрослый	32,5±0,5 / 57,2±0,5
883	Бандаж эпикондилитный	универсальный/universal	48,4±0,5 / 70,6±0,5
884	Бандаж коленного сустава	универсальный/universal	103,8±1,0 / 154,4±1,0
885	Бандаж коленного сустава открытый	универсальный/universal: детский	110,0±1,0 / 160,1±1,0
		универсальный/universal: взрослый	113,4±1,0 / 166,2±1,0
886	Бандаж для коленной чашечки	универсальный/universal	37,2±0,5 / 59,0±0,5
887	Бандаж для щиколотки	универсальный/universal: детский	79,0±1,0 / 115,0±1,0
		универсальный/universal: взрослый	83,4±1,0 / 119,4±1,0
888	Бандаж для поддержки бедр	универсальный/universal	132,0±1,0 / 164,0±1,0
892	Бандаж для поддержки икры	универсальный/universal	116,4±1,0 / 168,8±1,0
893	Бандаж для коленного сустава со спиральными пинами	универсальный/universal	199,0±2,0 / 252,2±2,0
894	Бандаж-стабилизатор коленного сустава	универсальный/universal: детский	284,0±3,0 / 335,0±3,0
		универсальный/universal: взрослый	297,4±3,0 / 351,8±3,0
897	Бандаж для щиколотки с гибкими стержнями	универсальный/universal: детский	83,4±1,0 / 119,4±1,0
		универсальный/universal: взрослый	101,8±1,0 / 150,0±1,0
311	Бандаж-шина статическая на запястье	1/S-M	186,6±2,0 / 218,0±2,0
		2/L-XL	220,0±2,0 / 252,2±2,0
320	Бандаж иммобилизатор колена	20	196,2±2,0 / 213,4±2,0
		25	240,0±2,0 / 270,0±2,0
		30	290,0±2,0 / 320,0±2,0

		35	329,0±2,0 / 359,0±2,0
		40	435,4±2,0 / 466,8±2,0
		50	594,8±2,0 / 641,0±2,0
		60	706,8±2,0 / 755,8±2,0
		70	796,8±2,0 / 841,8±2,0
331	Шина типа «Бейсбол»	1/S	6,8±0,1 / 8,2±0,1
		2/M	7,6±0,1 / 9,0±0,1
		3/L	8,6±0,1 / 10,6±0,1
332	Шина пальцевая изогнутая	1/S	4,2±0,1 / 5,4±0,1
		2/M	6,6±0,1 / 8,4±0,1
		3/L	9,0±0,1 / 10,6±0,1
333	Шина для защиты пальца	1/S	3,6±0,1 / 5,2±0,1
		2/M	5,4±0,1 / 7,4±0,1
		3/L	8,2±0,1 / 10,0±0,1
334	Шина типа «Раскладушка»	1/S	5,4±0,1 / 6,8±0,1
		2/M	8,6±0,1 / 9,8±0,1
		3/L	10,4±0,1 / 12,0±0,1
335	Шина типа «Лягушка»	1/S	4,8±0,1 / 6,4±0,1
		2/M	5,8±0,1 / 7,8±0,1
		3/L	6,4±0,1 / 8,0±0,1
336	Шина кольцевая пальцевая	1/S	2,0±0,1 / 10,0±0,1
		2/M	4,0±0,1 / 13,0±0,1
		3/L	6,0±0,1 / 14,0±0,1
		4/XL	8,0±0,1 / 16,0±0,1

340	Бандаж-шина большого пальца руки	1-2/S-M	30,8±0,2 / 47,0±0,2
		3-4/L-XL	33,2±0,2 / 55,0±0,2
345	Бандаж-шина большого пальца руки с дополнительной поддержкой	1-2/S-M	32,7±0,2 / 49,0±0,2
		3-4/L-XL	35,4±0,2 / 57,0±0,2
454	Бандаж на колено трикотажный шарнирный	1/S	300,0±5,0 / 356,6±5,0
		2/M	307,4±5,0 / 364,0±5,0
		3/L	323,8±5,0 / 380,0±5,0
		4/XL	335,0±5,0 / 391,2±5,0
		5/XXL	342,0±5,0 / 395,0±5,0
501	Твердая стелька для стопы	18	38,9±0,1 / 65,1±0,1
		19	40,1±0,1 / 67,2±0,1
		20	41,2±0,1 / 68,8±0,1
		21	42,2±0,1 / 69,4±0,1
		22	44,0±0,1 / 69,8±0,1
		23	45,0±0,1 / 71,0±0,1
		24	46,6±0,1 / 74,4±0,1
		25	48,0±0,1 / 76,0±0,1
		26	52,0±0,1 / 79,0±0,1
		27	56,4±0,1 / 84,2±0,1
		28	63,0±0,1 / 87,6±0,1
		29	71,2±0,1 / 90,0±0,1
		30	87,6±0,1 / 115,2±0,1
		31	89,8±0,1 / 117,4±0,1
		32	94,8±0,1 / 123,0±0,1

		33	93,0±0,1 / 125,0±0,1
		34	100,4±0,1 / 128,2±0,1
		35	107,0±0,1 / 136,6±0,1
		36	108,0±0,1 / 148,0±0,1
		37	123,8±0,1 / 151,6±0,1
		38	127,2±0,1 / 153,2±0,1
		39	130,4±0,1 / 158,2±0,1
		40	134,2±0,1 / 162,9±0,1
		41	148,2±0,1 / 176,0±0,1
		42	143,2±0,1 / 178,2±0,1
		43	157,0±0,1 / 187,9±0,1
		44	161,6±0,1 / 189,6±0,1
541	Силиконовая стелька с поддержкой арки	0/XS	200,4±2,0 / 249,6±2,0
		1/S	214,2±2,0 / 262,2±2,0
		2/M	239,0±2,0 / 286,6±2,0
		3/L	278,4±2,0 / 342,4±2,0
		4/XL	302,8±2,0 / 351,0±2,0
		5/XXL	304,0±2,0 / 356,4±2,0
542	Силиконовая стелька полной длины	0/XS	152,8±2,0 / 210,8±2,0
		1/S	175,6±2,0 / 223,2±2,0
		2/M	194,8±2,0 / 258,2±2,0
		3/L	215,0±2,0 / 274,0±2,0
		4/XL	233,0±2,0 / 292,2±2,0
		5/XXL	262,6±2,0 / 326,2±2,0

543	Силиконовая стелька 1/2 длины	1/S	128,4±2,0 / 171,0±2,0
		2/M	171,8±2,0 / 214,8±2,0
		3/L	190,4±2,0 / 233,0±2,0
		4/XL	195,0±2,0 / 237,8±2,0
		5/XXL	200,0±2,0 / 240,0±2,0
544	Силиконовая стелька под пятку	1/S	53,4±2,0 / 83,5±2,0
		2/M	85,0±2,0 / 104,2±2,0
		3/L	109,2±2,0 / 138,8±2,0
		4/XL	133,4±2,0 / 163,8±2,0
545	Силиконовая межпальцевая перегородка	1/S	11,2±0,1 / 17,6±0,1
		2/M	17,2±0,1 / 23,0±0,1
		3/L	22,4±0,1 / 27,6±0,1
546	Силиконовый межпальцевый клин	1-2/S-M	7,2±0,1 / 13,6±0,1
		3-4/L-XL	11,0±0,1 / 17,6±0,1
547	Силиконовое межпальцевое кольцо	1/S	6,2±0,1 / 12,0±0,1
		2/M	9,0±0,1 / 14,8±0,1
		3/L	11,6±0,1 / 18,0±0,1
548	Силиконовый колпачок для пальца ноги	1-2/S-M	6,4±0,1 / 12,4±0,1
		3-4/L-XL	10,0±0,1 / 16,2±0,1
549	Силиконовая стелька для передней части стопы	универсальный/universal	34,6±0,1 / 49,4±0,1
550	Силиконовая защита для плюснефалангового сустава	универсальный/universal	22,6±0,1 / 29,0±0,1
551	Силиконовая подушка под плюсневую кость с кольцом	универсальный/universal	41,4±0,5 / 52,6±0,5
552	Силиконовая подушка под плюсневую кость с разделителем	универсальный/universal	43,4±0,5 / 57,0±0,5
553	Силиконовый пальцевой гребень с петлей	универсальный/universal	10,0±0,1 / 16,0±0,1

554	Силиконовая подушка под плюсневую кость с разделителем	универсальный/universal	37,6±0,5 / 51,0±0,5
582	Клейкая силиконовая медиальная и латеральная накладка	1/S	102,2±2,0 / 157,6±2,0
		2/M	122,2±2,0 / 177,6±2,0
		3/L	146,6±2,0 / 201,8±2,0
		4/XL	152,8±2,0 / 209,2±2,0
584	Клейкая силиконовая пяточная накладка	1/S	54,6±1,0 / 85,4±1,0
		2/M	67,6±1,0 / 98,8±1,0
		3/L	89,8±1,0 / 119,0±1,0
		4/XL	94,4±1,0 / 121,2±1,0
589	Клейкая силиконовая метатарзальная накладка	1-2/S-M	50,0±0,5 / 65,8±0,5
		3-4/L-XL	63,0±0,5 / 78,8±0,5
590	Клейкая силиконовая продольная поддержка арки	1-2/S-M	44,0±0,5 / 72,8±0,5
		3-4/L-XL	45,2±0,5 / 74,2±0,5
591	Силиконовая стелька полной длины	1-2/S-M	191,0±3,0 / 228,2±3,0
		3-4/L-XL	263,6±3,0 / 300,4±3,0
593	Силиконовая стелька 1/2 длины	1/S	130,0±2,0 / 153,6±2,0
		2/M	160,6±2,0 / 184,8±2,0
		3/L	192,6±2,0 / 216,8±2,0
594	Силиконовая стелька под пятку	1/S	61,4±2,0 / 77,6±2,0
		2/M	92,0±2,0 / 108,0±2,0
		3/L	128,4±2,0 / 144,4±2,0
814	Стабилизатор лодыжки с воздушной подушкой	универсальный/universal	237,0±2,0 / 290,0±2,0
815	Стабилизатор лодыжки с подушкой из губки	универсальный/universal	204,0±2,0 / 256,0±2,0
816	Стабилизатор лодыжки с гелевой подушкой	универсальный/universal	311,0±2,0 / 363,0±2,0

828	Бандаж для стабилизации колена шарнирный	1/S	572,6±10,0 / 727,6±10,0
		2/M	615,4±10,0 / 767,4±10,0
		3/L	655,2±10,0 / 808,6±10,0
		4/XL	642,2±10,0 / 782,8±10,0
		5/XXL	687,2±10,0 / 840,6±10,0
833	Стабилизатор коленного сустава шарнирный	1/S	345,4±3,0 / 405,8±3,0
		2/M	357,2±3,0 / 417,0±3,0
		3/L	369,1±3,0 / 429,0±3,0
		4/XL	380,0±3,0 / 441,0±3,0
		5/XXL	392,0±3,0 / 462,0±3,0
844	Бандаж на лодыжку с опорой	1/S	102,0±2,0 / 123,0±2,0
		2/M	104,0±2,0 / 133,0±2,0
		3/L	108,0±2,0 / 143,0±2,0
		4/XL	110,0±2,0 / 153,0±2,0
858	Бандаж для стабилизации колена шарнирный с регулировкой высоты	универсальный/universal	1019,0±20,0 / 1289,8±20,0
859	Локтевой ортез ROM	универсальный/universal: детский	401,0±4,0 / 574,6±4,0
		универсальный/universal: взрослый	455,0±4,0 / 628,6±4,0
860	Бандаж-каркас при рекурвации коленного сустава	1/S	221,8±3,0 / 254,2±3,0
		2/M	250,2±3,0 / 297,8±3,0
		3/L	278,6±3,0 / 340,4±3,0
864	Устройство защитное на стопу	1/S	452,0±5,0 / 467,0±3,0
		2/M	473,0±5,0 / 488,0±5,0
		3/L	592,0±5,0 / 607,0±5,0

865	Устройство защитное на стопу Reflex АФО	1/S	97,4±1,0 / 108,2±1,0
		2/M	118,0±1,0 / 129,0±1,0
		3/L	141,0±1,0 / 152,0±1,0
		4/XL	147,4±1,0 / 158,4±1,0
898	Бандаж для стабилизации коленного сустава шарнирный	универсальный/universal	595±10,0 / 750,4±10,0

25. Условия транспортировки и хранения медицинского изделия, срок годности

Хранить изделия в сухом месте при комнатной температуре от +18 до +25С° с относительной влажностью воздуха 30-75% вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

Срок годности: 5 лет

Срок хранения изделия в упаковке: 5 лет

По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Условия хранения от +5 до +30С°

Относительная влажность воздуха: от 0 до 80%

Условия транспортирования: от -20 до +60 С°

Относительная влажность: от 0 до 90%

Не допускать воздействия органических растворителей, ионизирующего излучения или ультрафиолетовых лучей, так как это может привести к порче упаковки.

26. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует корректную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок сохранения медицинского изделия при ежедневном использовании и соблюдении рекомендаций, изложенных в инструкции по применению составляет 6 мес. при условии начала использования не позднее окончания гарантийного срока реализации.

27. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Изделие техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

28. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

Упаковка, неиспользованные изделия и изделия, бывшие в употреблении и не загрязненные биологическими жидкостями, утилизируются, как Класс А «эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам», изделия, загрязненные в процессе эксплуатации кровью и другими биологическими жидкостями утилизируются, как Класс Б «эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

29. Реклама

Официальный производитель: «VARİTEKS ORTOPEDİ SANAYİ A.Ş.»

Адрес: Maltepe Mah. Aile Bahçe Sok. Litros Yolu No. 10 Zeytinburnu - İstanbul / Turkey /
Малтепе Мах. Аиле Бахче Сок. Литрос Иолу №10 Зейтинбурну - г. Стамбул / Турция.
Представитель компании «VARİTEKS ORTOPEDİ SANAYİ A.Ş.» на территории РФ
для приема рекламаций: ООО «Руском» Адрес: Россия, 125493, г. Москва,
Кронштадтский бульвар, д.17, кор.2, кв. 266
тел.: + 7 (499) 783-90-78; + 7 (916) 599-96-23, эл. почта: variteks@gmail.com

30. Адреса производства

Maltepe Mah. Aile Bahçe Sok. Litros Yolu, No:10, 34010, Zeytinburnu / İstanbul / Turkey /
Малтепе Мах. Аиле Бахче Сок. Литрос Иолу №10, 34010, Зейтинбурну / г.Стамбул /
Турция.

Перевод с английского языка на русский язык

На фирменном бланке Variteks

Для предоставления в Компетентные Органы Здравоохранения Российской Федерации

Настоящим я подтверждаю, что содержание Инструкции по эксплуатации медицинского изделия «Бандаж медицинский «VARITEKS» растяжимый, регулируемый, нерастяжимый» является действительным и точным.

VARITEKS ORTOPEDI SANAYI A.S./ ВАРИТЭКС ОРТОПЕДИ САНАЙИ А.С., расположенная по адресу: **Малтепе Мах. Аиле Бахче Сок. Литрос Иолу № 10, Зейтинбурну г. Стамбул, Турция,** является разработчиком и оригинальным производителем изделия, упомянутого в документе.

Утверждено:

Окан Ёзюркаталай

Подпись уполномоченного лица от имени и по поручению

VARITEKS ORTOPEDI SANAYI A.S./ ВАРИТЭКС ОРТОПЕДИ САНАЙИ А.С.

Подпись

Дата: 04.12.2020

Перевод с турецкого языка на русский язык

Печать компании: **VARITEKS ORTOPEDI SANAYI A. S. / ВАРИТЭКС ОРТОПЕДИ САНАЙИ А. С.**

/Подпись/

Печать: Публичный нотариус

Штамп: ДОКУМЕНТ ИМЕЕТ «МОКРУЮ» ПЕЧАТЬ

Печать: Торгово-промышленная палата г. Стамбул

переводчик

Пахтуров Алексей Владимирович

Российская Федерация

Город Москва

Тридцатого апреля две тысячи двадцать первого года

Я, Шадрина Варвара Егоровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Моисеевой Лилии Владимировны, свидетельствую подлинность подписи переводчика ПАХТУНОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/995-н/77-2021- 6-2225

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Шадрина В.Е.Шадрина

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 166 лист(-а,-ов).

Шадрина В.Е.Шадрина

